

USER GUIDE

Medit Link (Revision 10) 2025.03.18

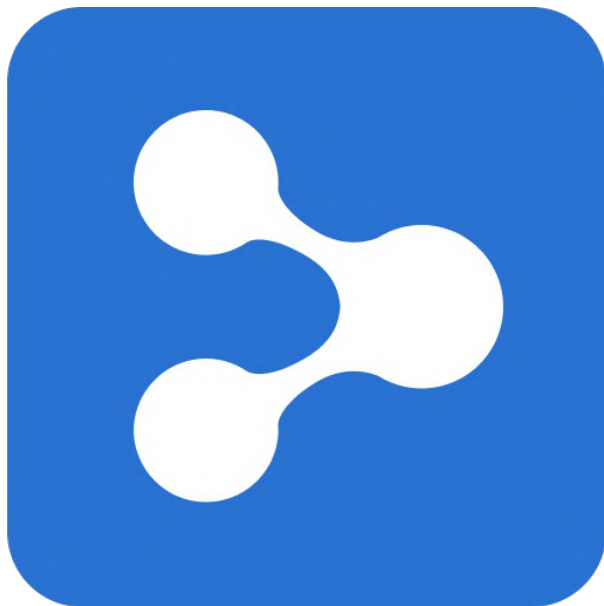


Table of Contents

Medit Link

Wprowadzenie	7
Medit Link	7
Omówienie usług	7
Usługa w chmurze	8
Platforma zarządzania przepływem pracy z systemem zamawiania	9

Medit Link > Instalacja

Wymagania systemowe	10
Wymagania systemowe dla Windows	10
Wymagania systemowe dla macOS	10
Wymagania systemowe dla serwisu internetowego	10
Zalecane dla przeglądarek	10
Minimalne wymagania dla urządzeń mobilnych	10
Instalacja w systemie Windows	11
Instalacja na macOS	14

Medit Link > Rozpoczęcie pracy

Zarejestruj się i Zaloguj	18
Strona internetowa Medit Link	18
Zarejestruj się	18
Logowanie i strona powitalna	21

Medit Link > Serwis internetowy Medit Link

Dashboard	24
Omówienie pulpitu Dashboard	24
Medit Insights	24
Subskrybuj Medit Insights	25
Zrezygnuj z subskrypcji Medit Insights	26
Patient	27
Szukaj pacjenta	27
Case Box/Work Box	28
Filtrowanie przypadków	28
Filtruj według pacjenta	28
Filtrowanie według statusu	31
Filtrowanie według czasu trwania	31
Filtruj według wyszukiwania	32
Szczegóły przypadku	32
Order Box/In Box	34
Szczegóły zamówienia	34
Zakładki w Order Box/In Box	34
Case Talk	35
Tworzenie Case Talk	35
Ustawienie typu uprawnień do udostępniania i opcje udostępniania	36
Szczegóły Case Talk	38
Web Viewer	39
Adnotacja	40
Komentarze	42

Udostępnianie ekranu w czasie rzeczywistym	42
Drzewo danych	42
Kontrola drzewa danych	42
Kontrola modelu 3D	43
Partners	45
Wyszukiwanie partnerów	45
Moja lista partnerów	45
Zaproszenie od partnera	46
Membership	47
Członkostwo	47
Medit Cloud Storage Plan	47
Przechowywanie w chmurze	49
Subskrybuj	49
Anuluj subskrypcję	51
Moja subskrypcja	52
Szczegóły	53
Subskrybuj ponownie	53
Jak dodać metodę płatności	54
Jak zmienić metodę płatności	55
Zrealizuj	55
Szczegóły	56
Zarejestruj Kod Realizacji	56
Aktywuj Kod realizacji	57
Szczegóły płatności	57
Zobacz szczegóły rachunku	58
My Info	60
Moje konto	60
Moja klinika/Moje laboratorium (tylko konto administratora)	60
Mój skaner	61
Pozostałe menu	63
Powiadomienie & Aktualizacja	63
Powiązane strony internetowe	63
Pobierz Medit Link App	64
 Medit Link > Medit Link App	
Omówienie	65
Poniższa tabela podsumowuje menu dostępne w każdym typie konta kliniki i laboratorium.	65
Pasek tytułowy	66
Moje informacje	66
Powiadomienia	66
Powiadomienie i aktualizacja	67
Ustawienia	67
Status sieci	68
Ustawienia	70
Ogólne	70
Zarządzanie pamięcią masową	71
Ustaw okres	72
Lokalna pamięć masowa	72
Przechowywanie w chmurze	72
Ustaw podłączony program	73
Opcje eksportowania	73
Narzędzie do konwersji przypadków	75

Eksportuj przypadek	76
Importuj przypadek	77
Opcje proxy	79
O programie	79
Podręcznik użytkownika	80
Menu	81
Dashboard	81
Patient	81
Dodaj nowego pacjenta	82
Usuń pacjenta	82
Łączenie pacjentów	83
Case Box/Work Box	83
Zakładki w Case Box/Work Box	84
Funkcje w Case Box/Work Box	84
Order Box/In Box	85
Zakładki w Order Box/In Box	86
Case Talk	86
App Box	87
Wszystko	87
Medit Apps	87
Pobrane	88
Trash Box	88
Administrator synchronizacji przypadków	89
Prześlij	89
Pobierz	90
Powiązane strony internetowe	90
Przeglądarka plików	92
Drzewo danych	92
Narzędzia kontroli modelu	92
Kontrola modelu 3D	93
Kontrola obrazu 2D	94
Narzędzia funkcyjne	94
Przechwytywanie obrazu i Notatka	94
Przechwytywanie obrazów ortodontycznych	95
Wypełnij luki	96
Przycinanie	97
Optymalizuj dopasowanie okluzji	99
Ruch żuchwy	102
Zarządzanie danymi wielu okluzji w przeglądarce plików	102
Jak zarządzać wieloma wynikami	102
Przeglądaj opcje	104
Filtry statusu	104
Typ przeglądania	105
Grupowanie	105
Sortowanie	105
Filtrowanie i wyszukiwanie	107
Filtruj według pacjenta	107
Filtr według daty	108
Zaawansowane możliwości wyszukiwania	109
 Medit Link > Przepływ pracy	
Utwórz/Edytuj/Klonuj/Usuń przypadek	110

Tworzenie przypadków	110
Tworzenie przypadku w Case Box (Klinika)	110
Utwórz przypadek w Work Box (Laboratorium)	111
Edycja przypadków	111
Edycja przypadku w Case Box (Klinika)	111
Edytuj przypadek w Work Box (Laboratorium)	112
Klonowanie przypadków	113
Klonowanie przypadku w Case Box (Klinika)	113
Klonowanie przypadku w Work Box (Laboratorium)	113
Usuwanie przypadku	114
Usuń przypadek (klinika i laboratorium)	114
Formularz informacji	115
Rejestrowanie formularza informacji w Case Box	115
Wprowadź na zakładce Formularz	115
Rejestrowanie formularza informacji w Work Box	115
Wprowadź na zakładce Formularz	115
Łączenie zębów do mostu	115
Ustawianie opcji skanowania	116
Medit Scan for Labs	116
Ogólne opcje	116
Opcje według zębów	116
Dodawanie do ulubionych	116
Dodaj do ulubionych	117
Zarządzaj ulubionymi szablonami	117
Praca nad Skanowaniem/CAD	118
Proces skanowania	118
Proces CAD	118
Korzystanie z aplikacji Add-in	118
Dodatek Szybkie uruchamianie	118
Zarządzanie uruchamianiem aplikacji	118
Szybkie uruchamianie	119
Wszystkie aplikacje	119
Uzyskaj pliki wyników	120
Eksportuj pliki z wynikami skanowania	120
Eksportuj pliki wyników z Listy przypadków	121
Eksportuj pliki wyników z Przeglądarki plików	124
Eksportuj pliki wyników z Drzewa danych	125
Eksportuj listę przypadków jako CSV	128
Eksport linii brzegowej	129
Eksportuj linię brzegową jako kolor	129
Eksportuj linię brzegową jako plik	130
Pobierz pliki z Medit Link Web	130
Case Box/Work Box	131
Web Viewer	131
Zamówienie/Zarządzanie zamówieniami	134
Zamawianie przypadków	134
Potwierdź zamówienie (In Box)	135
Anuluj zamówienie (Order Box)	135
Odrzucenie zamówienia (In Box)	135
Sprawdzanie zamówionych przypadków	135
Wprowadzanie informacji o przesyłce (In Box)	136
Zarządzanie terminem dostawy	136

Ustawianie wnioskowanej daty dostawy (konto kliniki)	136
Ustawianie przewidywanej daty dostawy (konto laboratorium)	137
Zakończenie przypadku	138
Zakończ (Work Box/In Box)	138
Zakończ przypadek z opcji szczegóły przypadku	138
Zakończ wiele przypadków z listy przypadków	139
Zakończ (Case Box/Order Box)	139
Zakończ nie zamówiony przypadek w Case Box.	139
Komunikuj się za pomocą tagów	141
Dodaj tagi podczas tworzenia nowego przypadku	141
Dodaj tagi podczas składania zamówienia	142
Sprawdź tagi w Szczegółach przypadku.	142

Wprowadzenie

Medit Link

Medit Link to narzędzie do współpracy zaprojektowane w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy klinikami i laboratoriami, aby zapewnić optymalny przebieg pracy dla każdej ze stron.

Oferuje zróżnicowane funkcje w oparciu o typ i uprawnienia każdego konta. Program zapewnia przyjazny interfejs użytkownika do zarządzania przepływem pracy, od skanowania za pomocą skanerów jamy ustnej i modeli, zamawiania przypadków, po projektowanie i wykonywanie protez.

Medit Link składa się z usługi internetowej i aplikacji komputerowej.

Omówienie usług

		Web	Aplikacja
		• Rejestracja i zarządzanie kontem • Wyszukaj i zarządzaj partnerami • Udostępniaj przypadki poprzez Web Viewer z linkiem do udostępniania • Uzyskaj dostęp do przypadków wykonanych z aplikacji • Zarządzaj zamówieniami	• Wprowadź Formularz informacji • Skanuj • Zarządzaj zamówieniami • Połącz się z CAD • Zarządzaj pacjentami
Klinika	Administrator	Wyszukuj i zarządzaj partnerami i swoimi klinikami oraz udostępniaj przypadki. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Wprowadź formularz informacji, skanuj, składaj zamówienia i zarządzaj pacjentami. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Członek	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Laboratorium	Administrator	Wyszukuj i zarządzaj partnerami i swoim laboratorium oraz udostępniaj przypadki. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Wprowadź formularz informacji, skanuj i zarządzaj zamówieniami. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Członek	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Usługa w chmurze

Medit Link obsługuje automatyczne przesyłanie/pobieranie baz danych i plików poprzez AWS (Amazon Web Services).

Dane przechowywane w chmurze są automatycznie synchronizowane z komputerami wielu użytkowników w organizacji, dzięki czemu mogą oni uzyskać dostęp do tych samych danych z dowolnego komputera w dowolnym czasie. Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych z wykorzystaniem chmury zapewnia bezpieczeństwo wszystkich danych. Zapewnia to bezpieczeństwo danych nawet w przypadku utraty danych w wyniku nagłej awarii komputera.

Usługa w chmurze umożliwia partnerskim dentystom i laboratoriom szybkie udostępnianie danych bez kłopotliwego przesyłania skanów pocztą elektroniczną lub manualnie. Wszystkie dane, w tym informacje o pacjentach, są bezpiecznie zaszyfrowane, przechowywane i przesyłane. Medit jest zgodny z przepisami i regulacjami medycznymi, takimi jak HIPAA i GDPR.

Platforma zarządzania przepływem pracy z systemem zamawiania

Medit Link oferuje własny system zamówień.

- Medit Link pozwala użytkownikom nawiązywać współpracę między dentystami i laboratoriami dentystycznymi oraz szybko i łatwo udostępniać dane.
- Możesz sprawdzać i zarządzać statusem zamówienia.

Wymagania systemowe

Uwaga

Prosimy zapoznać się z wymaganiami systemowymi dla Medit Scan for Clinics i Medit Scan for Labs, jeśli chcesz używać oprogramowania do skanowania ze swoim skanerem.

Wymagania systemowe dla Windows

	Laptop & Komputer stacjonarny
PROCESOR	Intel Core i5 2.6 GHz lub wyższy
PAMIĘĆ RAM	16 GB lub więcej
GRAFIKA	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) lub wyższa / lub równoważna karta graficzna AMD
OS	Windows 10 64 Bit (nieдоступny w wersji 32 Bit) lub wyższy

Wymagania systemowe dla macOS

	Mac
Procesor	M1 z 8-rdzeniowym, 7-rdzeniowym GPU, 16-rdzeniowym silnikiem neuronowym
PAMIĘĆ RAM	16 GB lub więcej
OS	Monterey 12 lub wyższy

Wymagania systemowe dla serwisu internetowego

Zalecane dla przeglądarek

	Przeglądarki
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimalne wymagania dla urządzeń mobilnych

	Android	iOS
Urządzenie	Odpowiednik Galaxy S7 lub nowszy	Odpowiednik iPhone'a 7 lub wyższy
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
PAMIĘĆ RAM	3 GB lub więcej	2 GB lub więcej
AP	Powyżej Snapdragon 710	A10 Fusion


Instalacja w systemie Windows

Medit Link jest instalowany w pakiecie z programami do pozyskiwania skanów - Medit Scan for Clinics i Medit Scan for Labs.


1. Uruchom Medit_LinkSetup.exe.
2. Wybierz język instalacji.
3. Wybierz folder do zainstalowania Medit Link. Przeczytaj i zaakceptuj zasady i warunki licencji i kliknij "INSTALUJ".

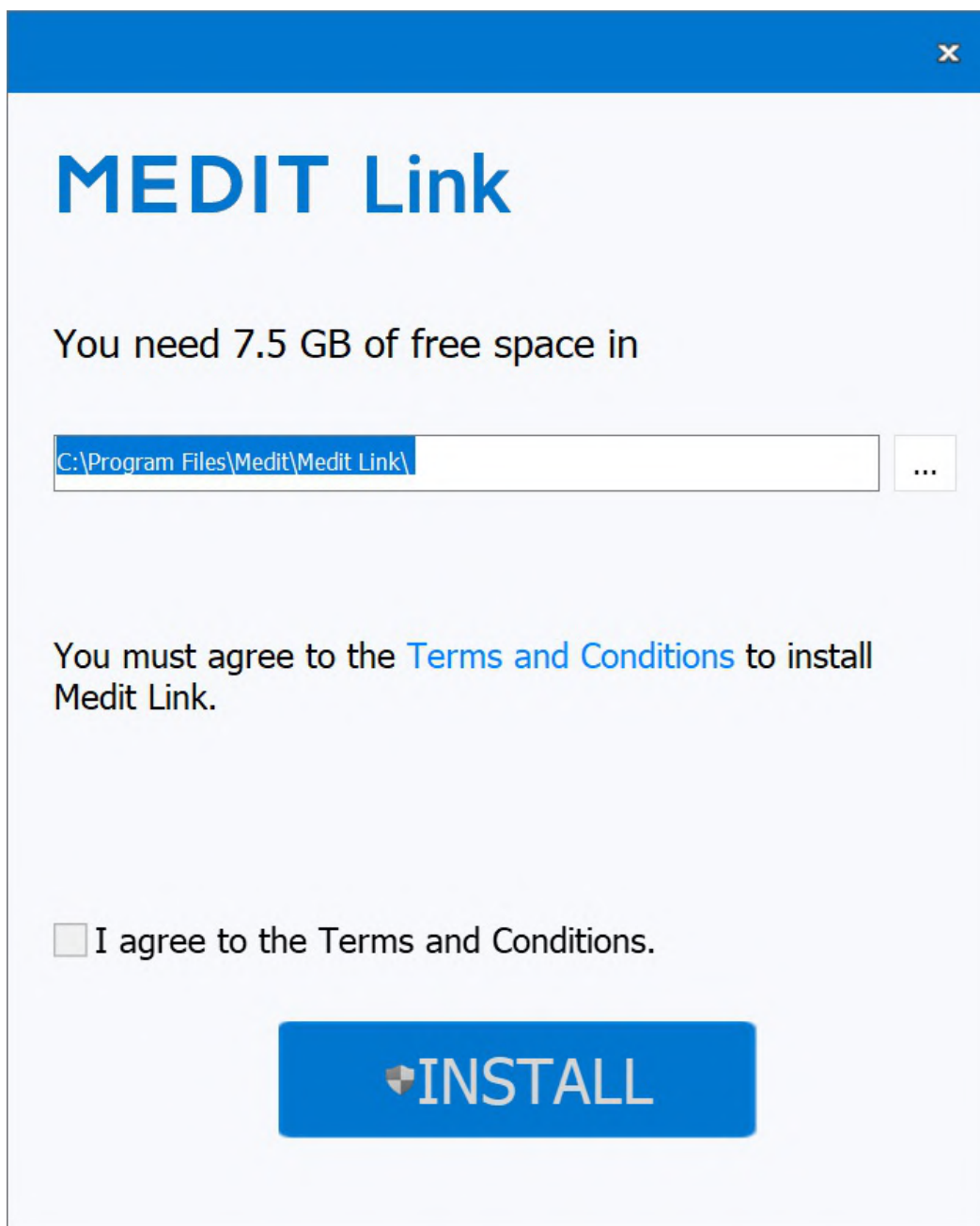

4. Upewnij się, że kabel skanera jest odłączony od komputera przed przejściem do następnego kroku. Instalacja może nie postępować, jeśli skaner jest podłączony do komputera.
5. Program zostanie zainstalowany automatycznie i może to potrwać kilka minut. Nie wyłączaj ani nie odłączaj komputera do momentu zakończenia instalacji.

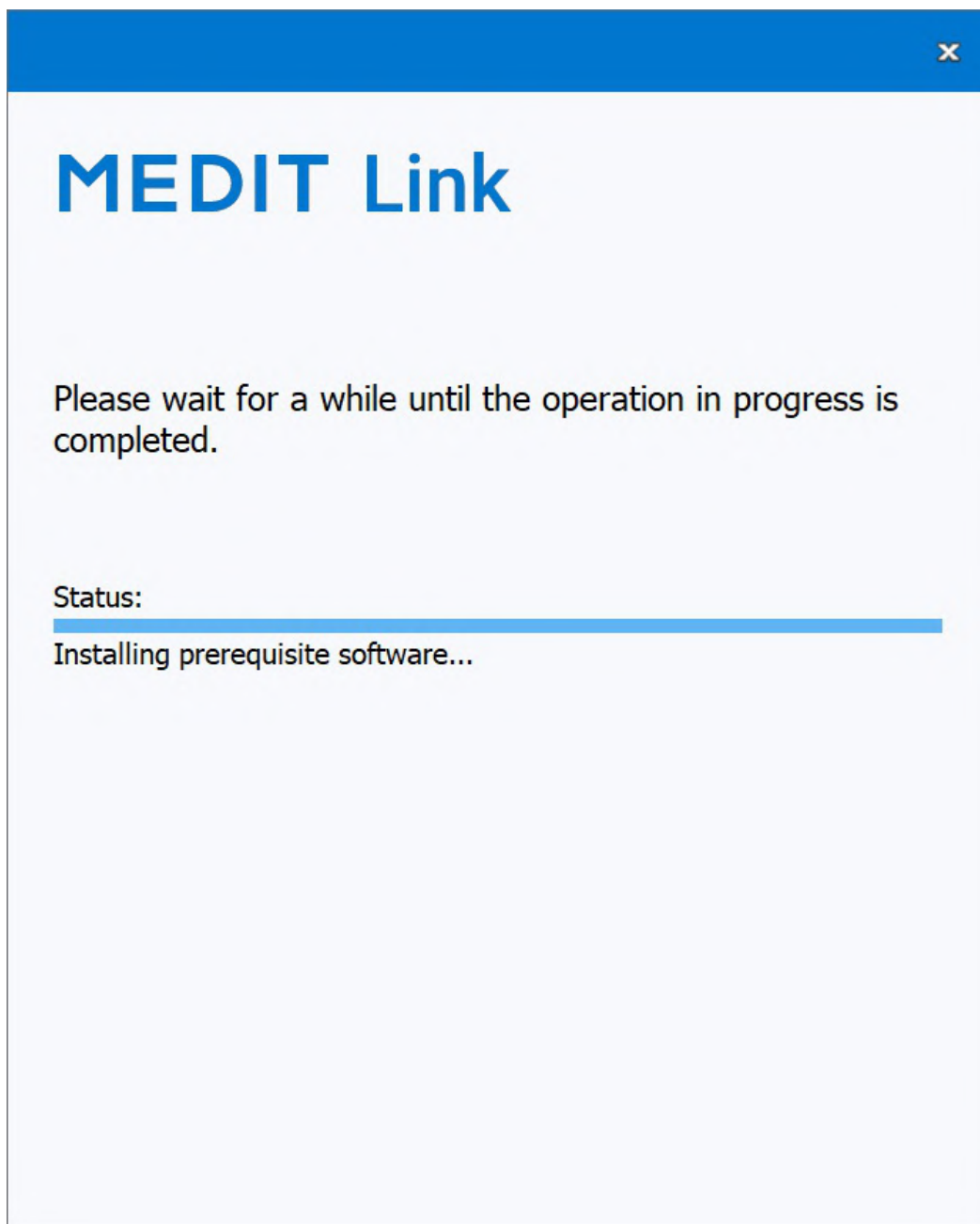

6. Po zakończeniu instalacji należy ponownie uruchomić komputer. Możesz kontynuować bez ponownego uruchamiania komputera, jeśli nie masz skanera.

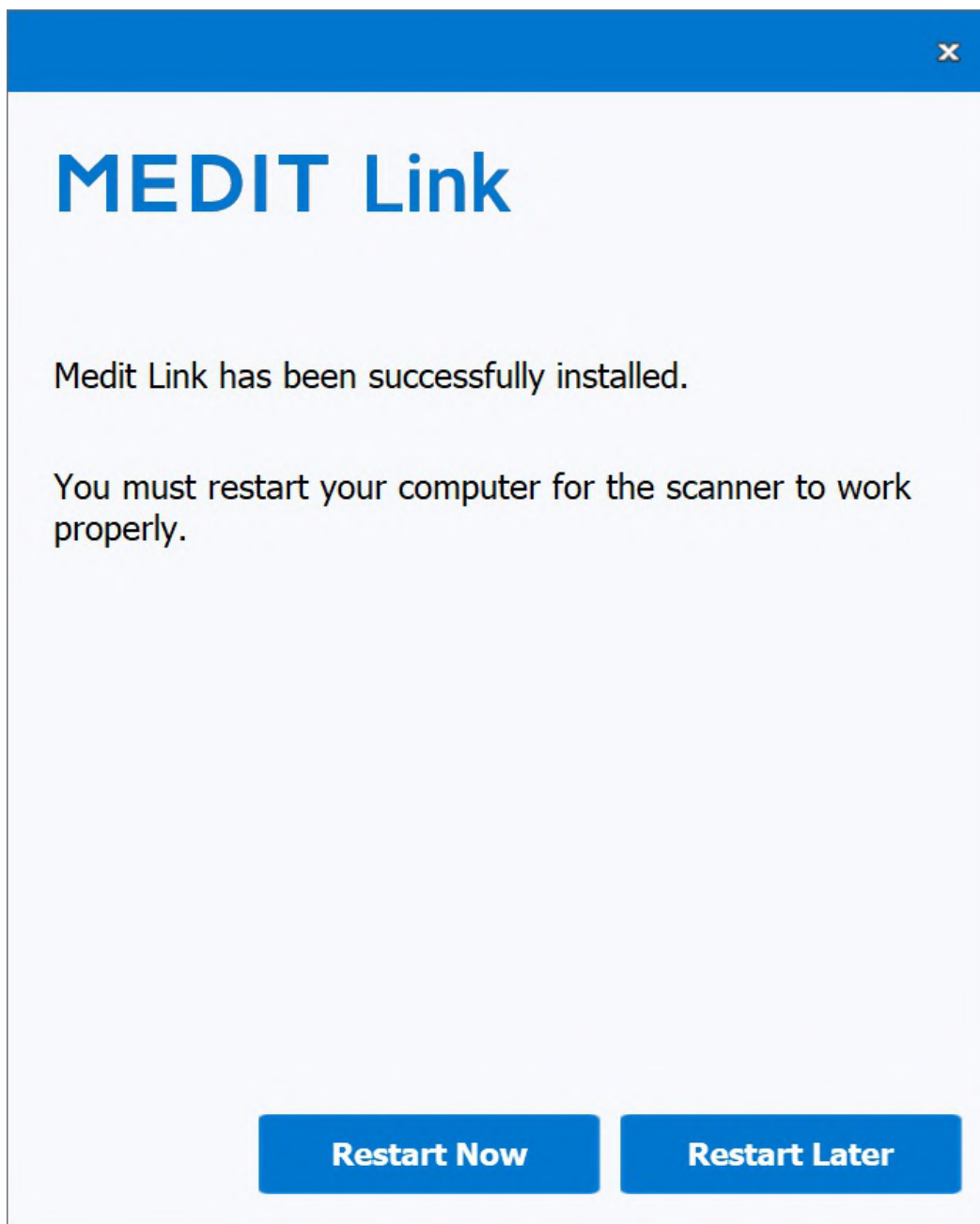


 Uwaga

Jeśli po zakończeniu instalacji nie uruchomisz ponownie komputera, skaner może nie działać prawidłowo.


Instalacja na macOS

Medit Link jest instalowany jako pakiet z Medit Scan for Clinics.


1. Uruchom Medit_Link_x.x.x.pkg i kliknij "Dalej".

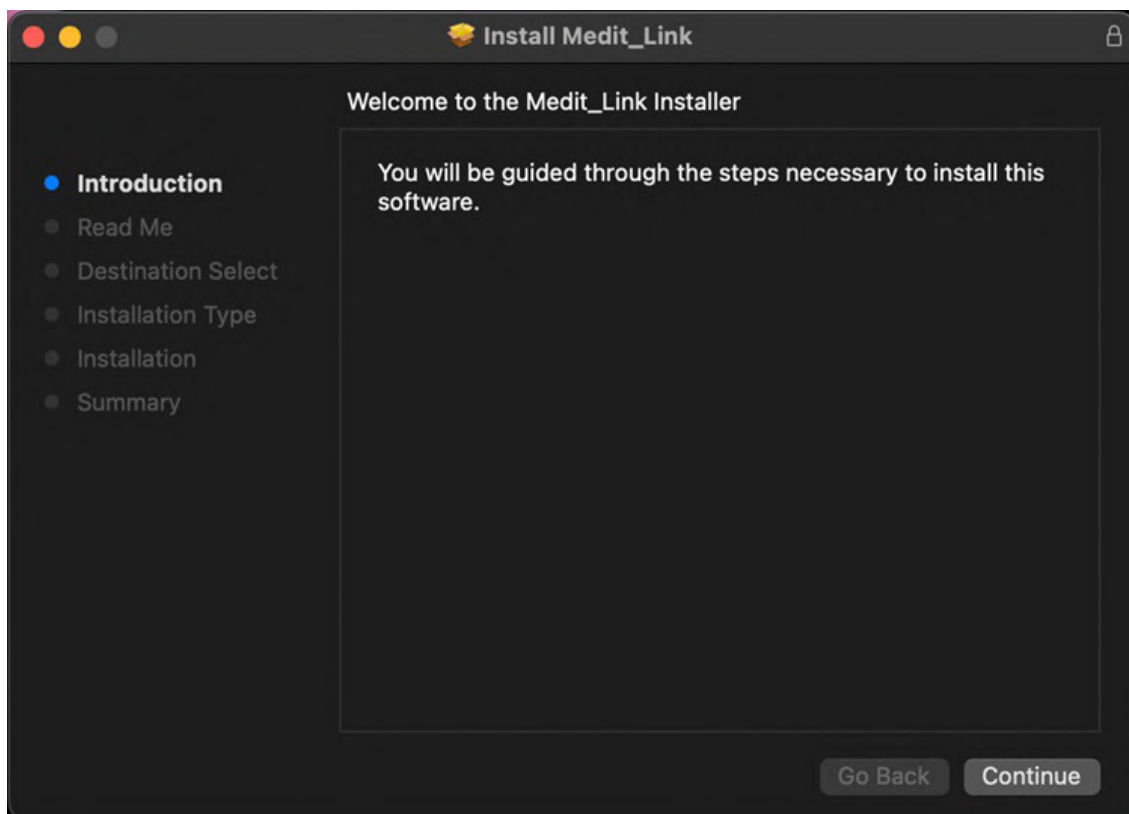


2. Przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego i kliknij "Dalej".

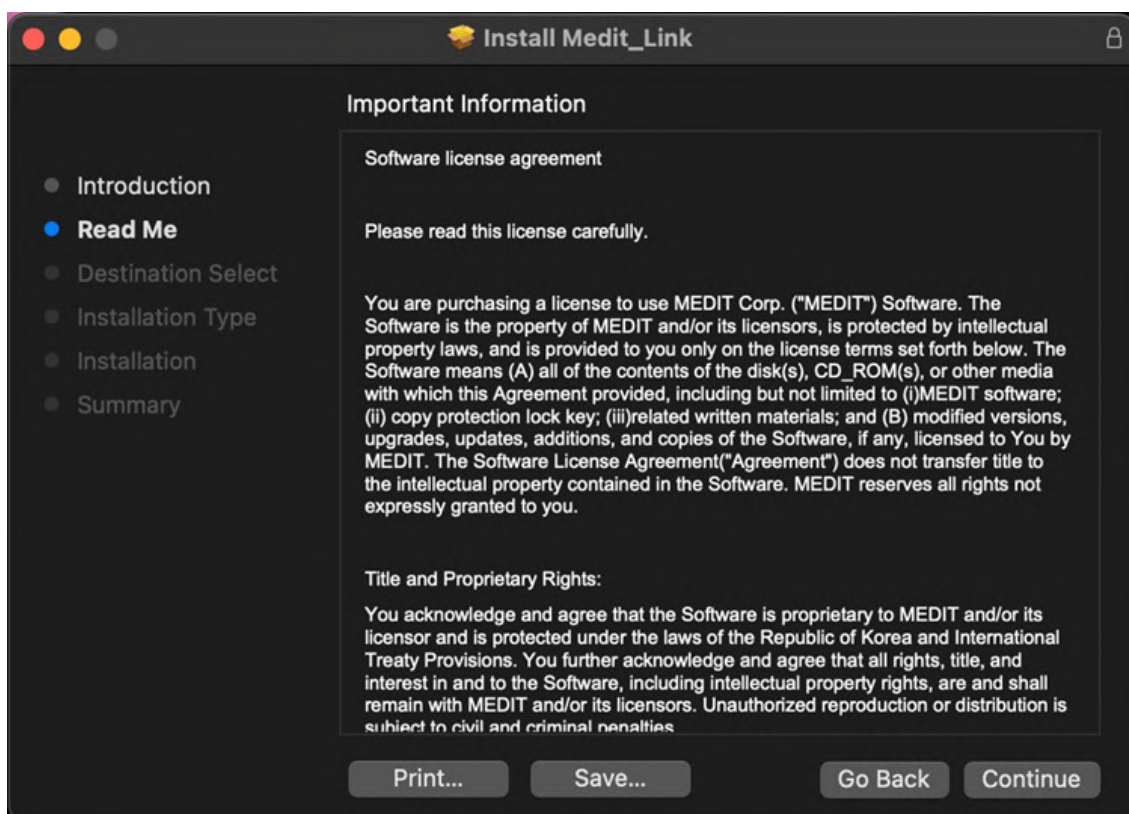

3. Wybierz dysk do instalacji i kliknij "Dalej".

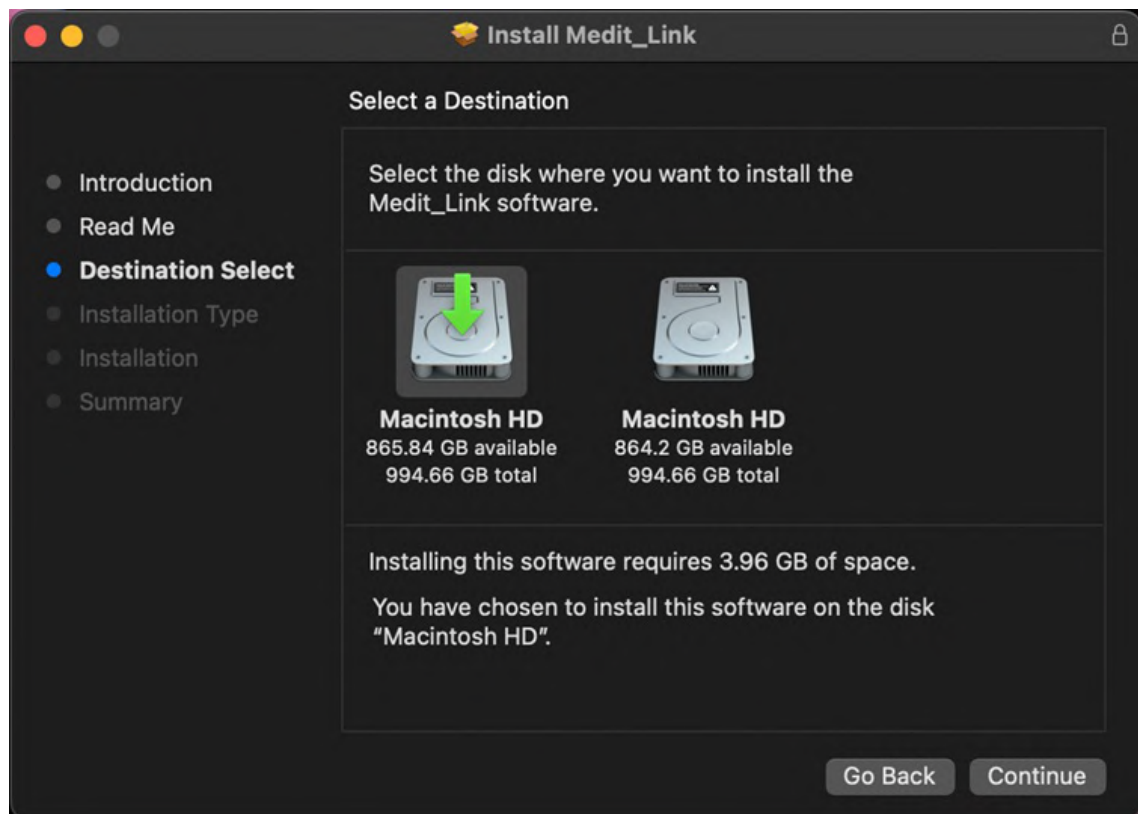


4. Kliknij "Zmień lokalizację instalacji...", aby zmienić miejsce docelowe instalacji.

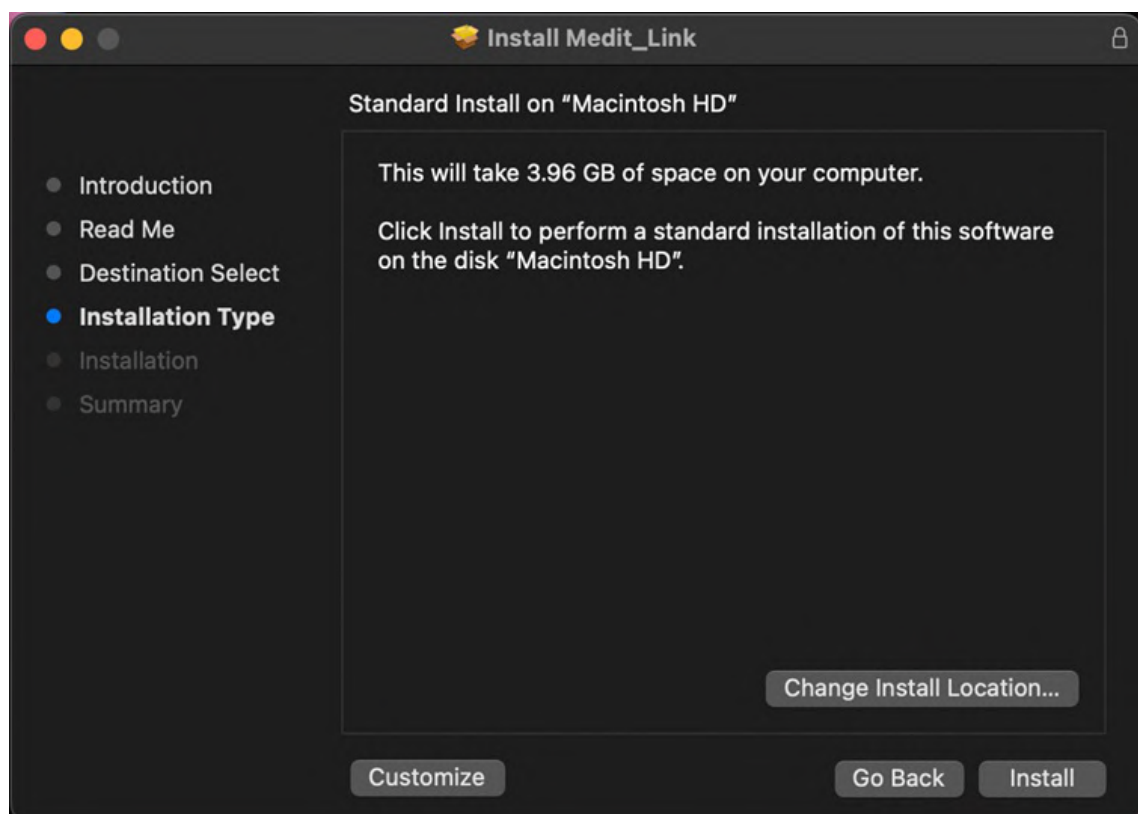


5. Kliknij "Instaluj" i wpisz swoje hasło do komputera Mac, aby zezwolić na instalację, jeśli będzie to wymagane.



6. Poczekaj, aż instalacja zostanie zakończona.

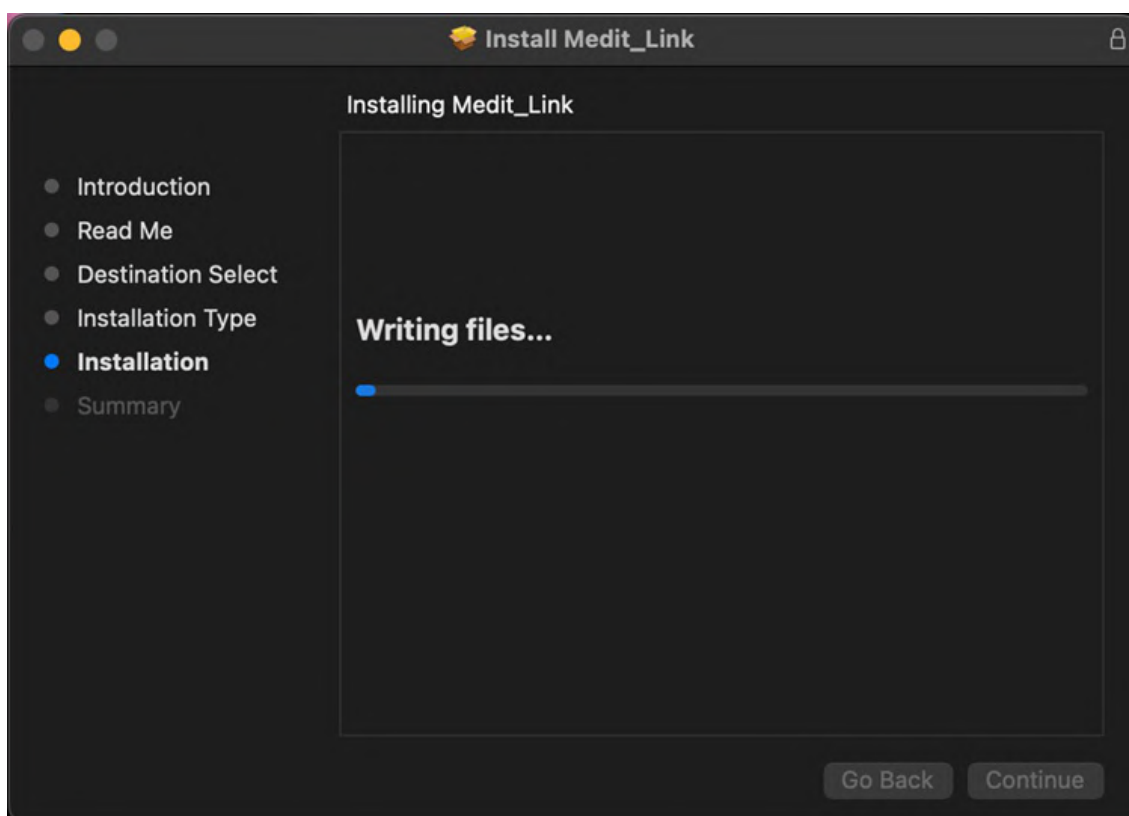


7. Kliknij "Zamknij", aby wyjść z okna instalacji.

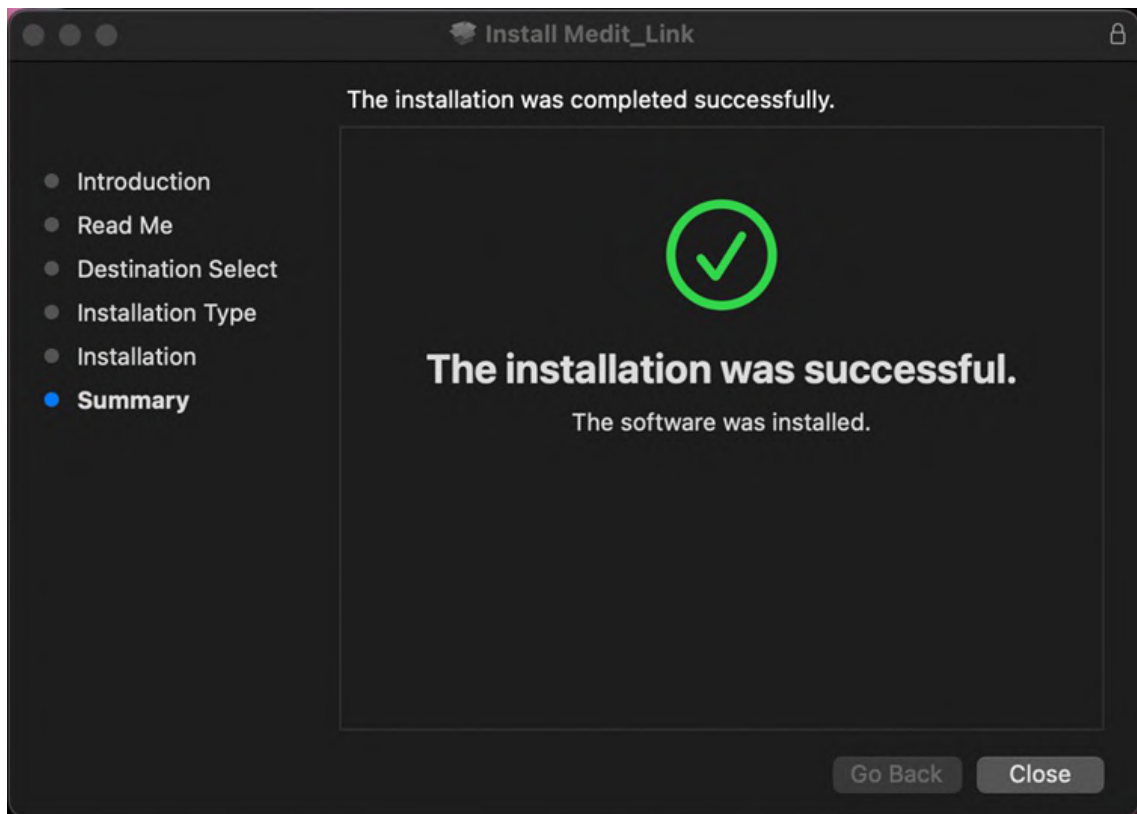

Zarejestruj się i Zaloguj

Strona internetowa Medit Link

Zarejestruj się w serwisie Medit Link na stronie www.meditlink.com.

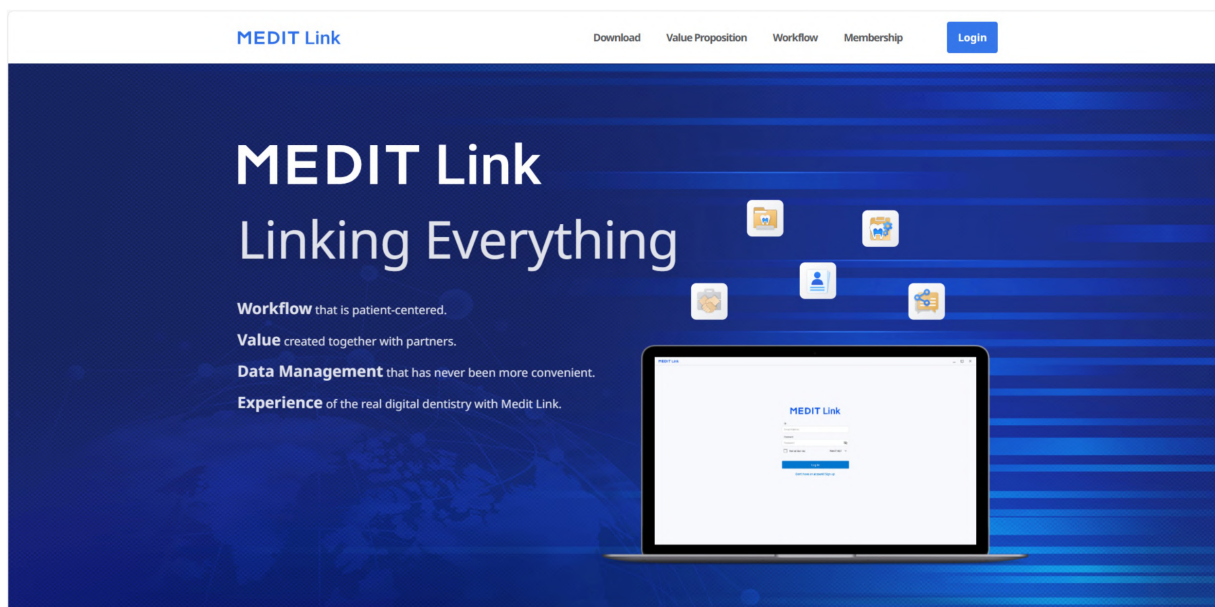

Uwaga

Zarejestruj się w Medit Link China na stronie www.meditlink.cn.

Zarejestruj się

Aby korzystać z usługi Medit Link, należy założyć konto. Po założeniu konta jako klinika lub laboratorium można korzystać z funkcji dostępnych w Medit Link.

Użytkownicy mogą wybrać jeden z następujących czterech typów kont, aby zarejestrować członkostwo i korzystać z serwisu z pełnymi lub ograniczonymi funkcjami i uprawnieniami, w zależności od typu konta.

- Klinika - Administrator
- Klinika - Członek
- Laboratorium - Administrator
- Laboratorium - Członek

Administrator jest zazwyczaj przedstawicielem Twojej organizacji i będzie miał pełny dostęp do wszystkich funkcji i usług Medit Link. Z kolei konto członkowskie ma ograniczony dostęp.

Aby zarejestrować członkostwo, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij "Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się" na stronie logowania.

MEDIT Link

ID

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? [Sign up.](#)



English (United States)



2. Po przeczytaniu zamieszczonych opisów należy kliknąć przycisk "Zarejestruj" dla wybranego typu konta.

Create Your Medit Link Account



Clinic


Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

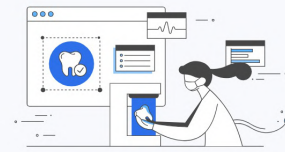

Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Pojawi się następujący formularz rejestracyjny.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

View

View

View

Back

Register

4. Wprowadź nazwę kliniki lub laboratorium, a następnie, w zależności od pożądanego typu konta, wykonaj następujące czynności:
 - Jeśli rejestrujesz się jako administrator, kliknij "Sprawdź dostępność", aby sprawdzić, czy wprowadzona nazwa jest dostępna.
 - Jeśli rejestrujesz się jako członek, kliknij "Szukaj". Administrator musi zarejestrować Twoją organizację zanim się zarejestrujesz.
5. Wypełnij pozostałą część formularza rejestracyjnego i kliknij "Zarejestruj".

Uwaga

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych podczas rejestracji, będziesz otrzymywać pomocne informacje o produkcie i usłudze od Medit.

6. Zostanie do Ciebie wysłany e-mail weryfikacyjny.
7. Aby zakończyć proces rejestracji, zweryfikuj swój adres e-mail za pomocą otrzymanego linku.

Logowanie i strona powitalna

1. Wprowadź swój adres e-mail i hasło na stronie logowania i kliknij "Zaloguj się".

MEDIT Link

ID

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.




English (United States)



2. Poniższe wyskakujące okienko pojawi się, jeśli nie wypełniłeś informacji o swojej firmie.

Welcome, stage-test-wh!

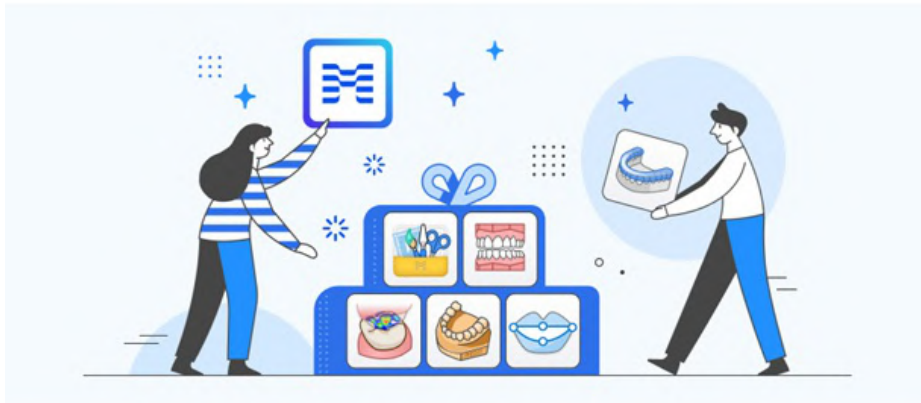

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

Uwaga


Aby korzystać z usług Medit Link, informacje o klinice lub laboratorium należy wprowadzić przy użyciu konta administratora.

3. Kliknij przycisk "Przejdź do mojej kliniki" lub "Przejdź do mojego laboratorium" i wprowadź informacje o klinice lub laboratorium, w tym nazwę firmy, zdjęcia okładki/logo, oferowane usługi, adres biura, numer biura itp.
4. Informacje wprowadzone na stronie powitalnej mogą być edytowane w dowolnym momencie w zakładce My Info > Moja klinika lub Moje laboratorium w Medit Link Web.

Dashboard

Omówienie pulpitu Dashboard

Możesz przeglądać statystyki całej pracy wykonanej w Medit Link na wizualizowanych wykresach - zarówno w aplikacji Medit Link, jak i w Internecie.

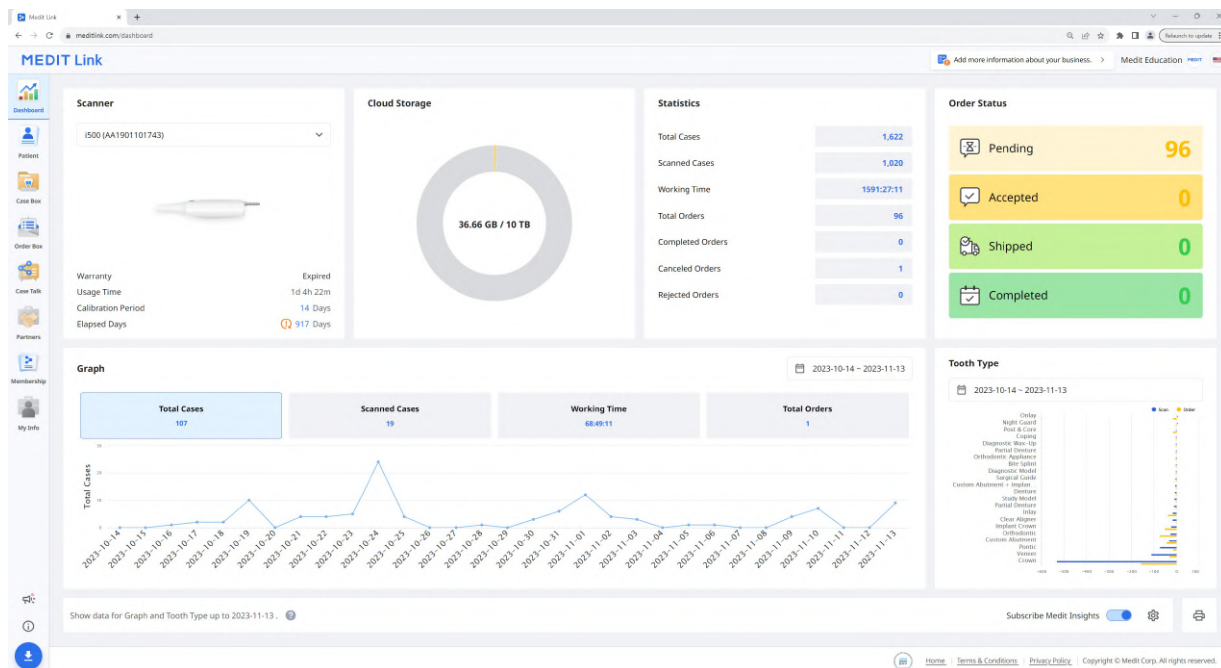

Wykresy i tabele na dashboard pokazują statystyki całej pracy wykonanej w Medit Link.

Skaner	Podaje informacje o aktywnych skanerach, w tym gwarancję, czas użytkowania skanera, interwał kalibracji i czas, jaki upłynął od kalibracji.
Przechowywanie w chmurze	Wyświetlanie całkowitej pojemności chmury i ilości w użyciu.
Statystyki	Udostępnianie statystyk dotyczących przypadków na podstawie statusu pracy.
Status zamówienia	Udostępnianie statystyk dotyczących przypadków na podstawie statusu zamówienia.
Wykres	Wykres informacji o pracy według okresu.
Typ zęba	Udostępnianie statystyk dotyczących liczby skanów i zleceń według informacji o leczeniu.


Medit Insights

Medit Insights to usługa raportowania, która pomaga analizować statystyki użytkowania.

Uwaga

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link China.

- [Medit Insights](#)

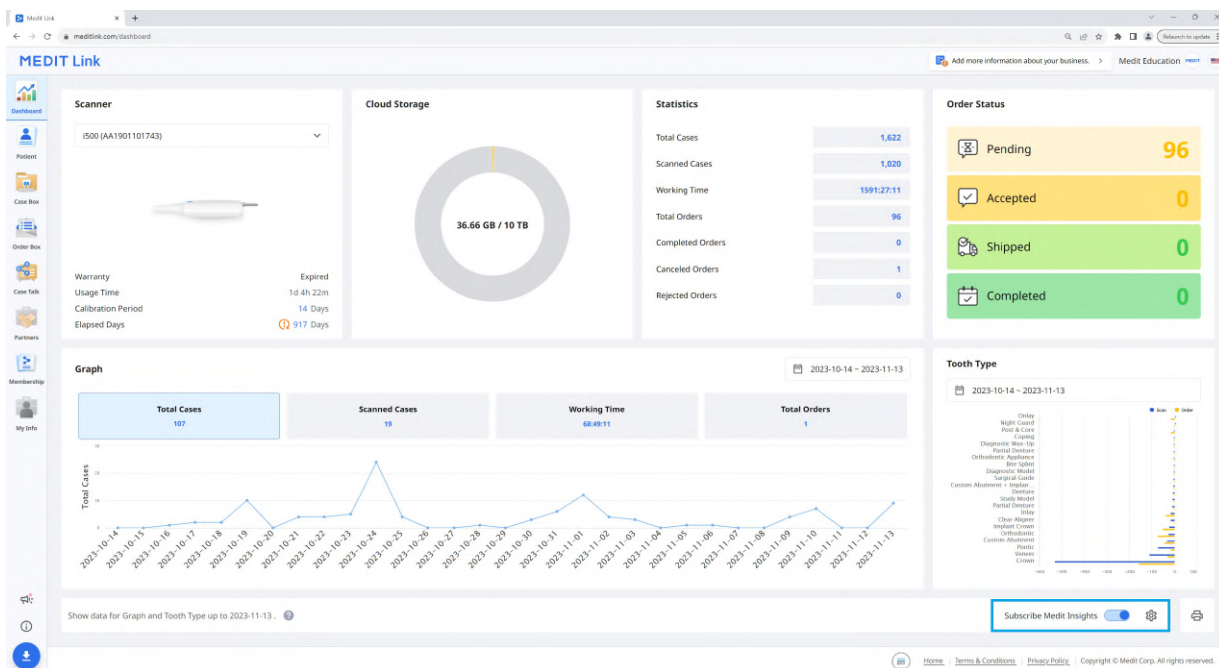

Subskrybuj Medit Insights

Możesz otrzymać maila z raportem drugiego dnia każdego miesiąca. Nie jest wymagany żaden dodatkowy proces rejestracji. Wystarczy włączyć opcję "Subskrybuj Medit Insights".

Jeśli nie korzystasz z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta Medit Link, możesz ustawić inny adres e-mail do otrzymywania Medit Insights.

Settings

Receive the report via

- ☒ Medit Link account
- ☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

i The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

Drugiego dnia każdego miesiąca otrzymasz wiadomość e-mail ze statystykami, jak pokazano poniżej.

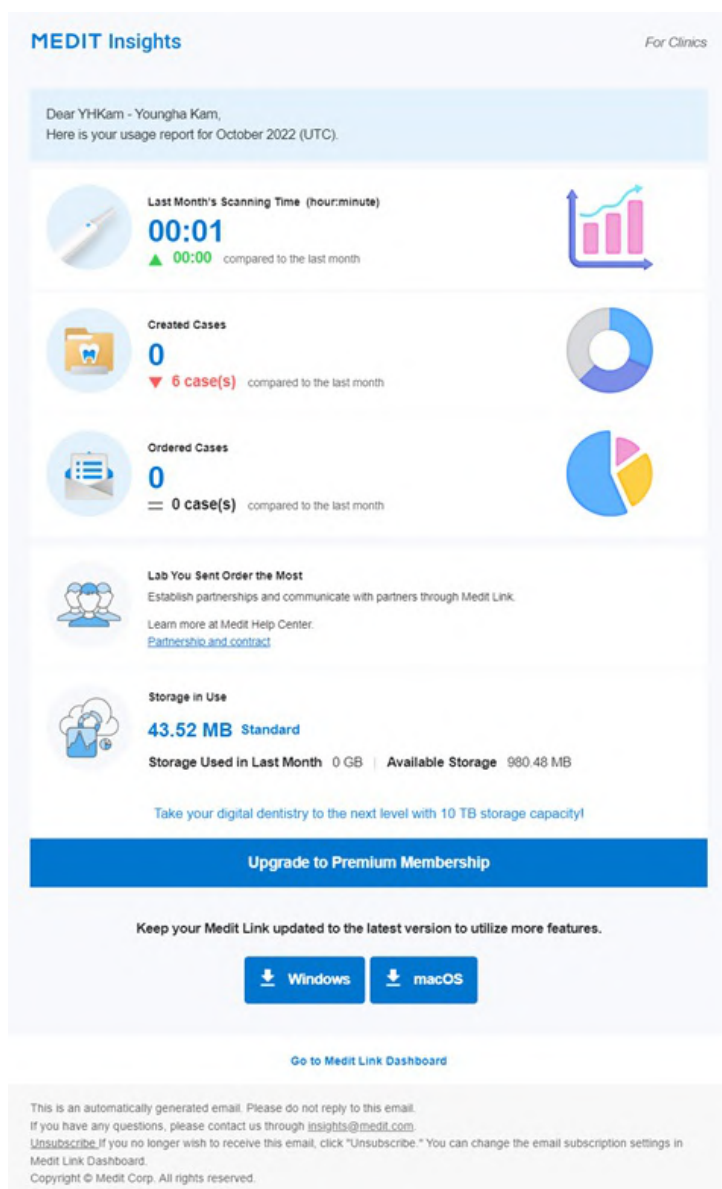

Banner	Medit dostarcza tutaj przydatne wskazówki i informacje. * Jeśli nie chcesz widzieć banera, usuń zaznaczenie pola wyboru Umowa ws. marketingu i promocji w Moje informacje> Moje konto.
Informacje statystyczne	Wyświetlane są informacje statystyczne, takie jak czas skanowania, utworzone przypadki, najczęściej zamawiane laboratorium itp.
Pobieranie Medit Link	Przycisk udostępnia link do pobrania Medit Link.
Dashboard	Wszystkie informacje statystyczne są oparte na informacjach z pulpitu Dashboard. Więcej szczegółów możesz zobaczyć w Dashboard.

Zrezygnuj z subskrypcji Medit Insights

Wyłącz "Subskrybuj Medit Insights" w Dashboard lub kliknij "Zrezygnuj z subskrypcji" w otrzymanej wiadomości e-mail.

Patient

Możesz zarządzać przypadkami na podstawie imienia i nazwiska oraz ID pacjenta.

Wszyscy pacjenci zarejestrowani za pośrednictwem aplikacji Medit Link są wyświetlani na liście, co ułatwia zarządzanie pacjentami i ich przypadkami.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
159	121	1212-12-04	♂	1	-	2025-02-13 16:17	2019-01-29 14:12
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	2	2025-01-06 18:28	2025-02-13 16:17	2025-01-13 15:07
hik.lee	-	-	-	1	-	2025-02-12 15:23	2022-04-18 20:06
TEST	-	-	-	1	-	2025-02-12 09:35	2025-02-11 17:17
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	1	2025-01-06 18:28	2025-02-10 18:22	2025-01-14 12:17
exocad form only	-	-	-	1	-	2025-02-09 12:06	2025-02-09 12:06
240625 덴티스 스캔배디 매칭	-	-	-	2	2024-06-25 15:14	2024-07-09 10:21	2024-07-09 10:21
m	-	-	-	0	-	2024-04-16 11:16	2024-04-16 11:16
3.3.0.136 TEST	-	-	-	1	-	2024-04-12 15:17	2024-04-12 15:17
3.3.0 STAGE TEST	-	-	-	1	-	2024-04-09 14:58	2024-04-09 14:58

Szukaj pacjenta

1. Wybierz kryteria wyszukiwania między imieniem i nazwiskiem pacjenta a ID pacjenta z menu rozwijanego w prawym górnym rogu listy pacjentów.

View Options

Patient ID ^ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Wprowadź imię i nazwisko lub ID pacjenta, aby wyszukać zgodnie z wybranymi kryteriami wyszukiwania.
3. Tylko pacjenci z wprowadzonym imieniem i nazwiskiem lub ID pacjenta są wyświetlani na liście.

Case Box/Work Box

Case Box (Klinika) lub Work Box (Laboratorium) pokazuje wszystkie przypadki, które użytkownik utworzył w aplikacji Medit Link. Pliki możesz oglądać za pośrednictwem przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania osobnego programu.

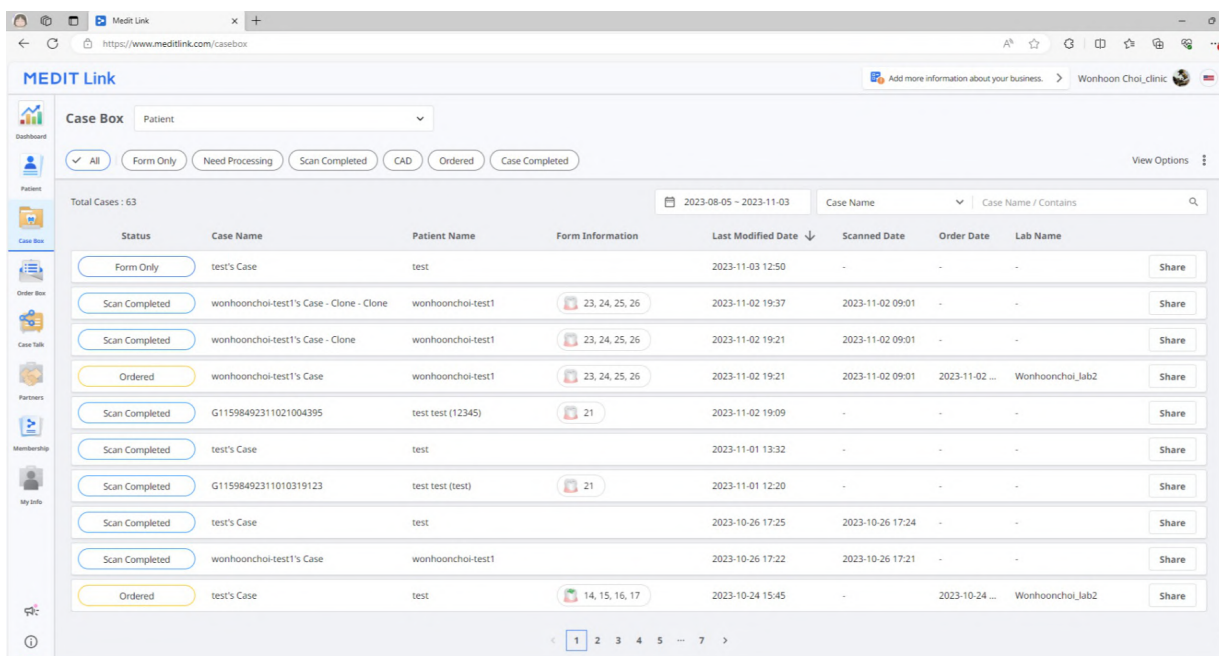


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo and a user profile. Below the header, there's a sidebar with navigation icons. The main area displays a list of cases. At the top of the list, there are filters: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. Below the filters, there's a table with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table contains several rows of case data. At the bottom of the table, there's a pagination bar showing '1' out of 7 pages.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2

Filtrowanie przypadków

Filtruj według pacjenta

Możesz filtrować przypadki według pacjentów. Jest to przydatne kiedy szukasz przypadków dla konkretnych pacjentów.

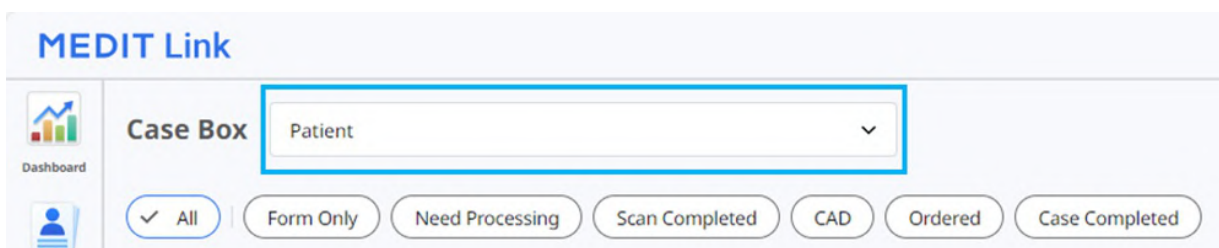

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' label is highlighted. Below it, there's a dropdown menu with the text 'Patient' and a downward arrow. Below the dropdown menu, there are several filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Wprowadź imię i nazwisko pacjenta w polu wyszukiwania.

Patient

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. Wybierz pacjenta z listy wyników wyszukiwania.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -+ 2 ^

test⊗

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

Selected Patients


[Clear Selection](#)

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -


☒ test / - / - / -

3. Na liście wyświetlane są tylko przypadki wybranych pacjentów, co ułatwia znalezienie przypadków, z którymi chcesz pracować.

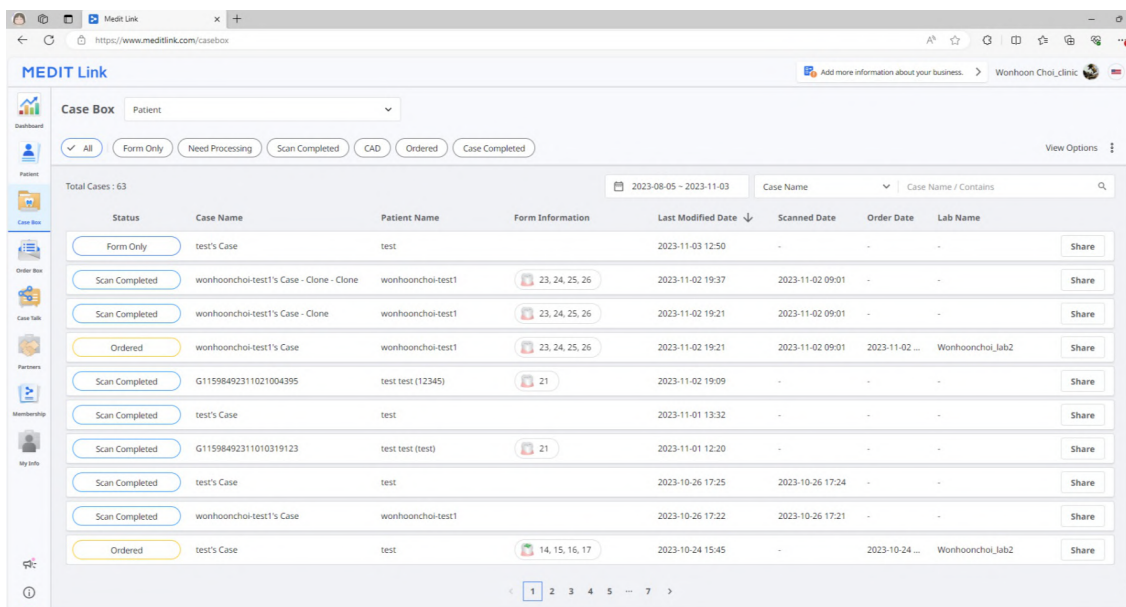

Filtrowanie według statusu

Możesz filtrować przypadki na podstawie ich statusu.

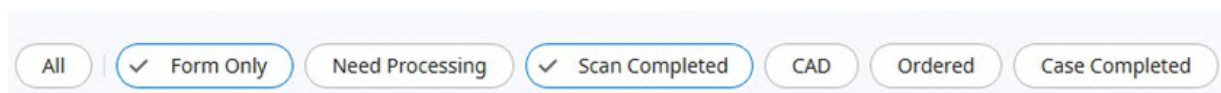

- Użytkownik może kliknąć status, który chce zobaczyć. Przeglądarka wyświetli tylko przypadki z wybranym statusem.
- Użytkownik może wybrać wiele statusów jednocześnie.

W zależności od typu konta dostępne są następujące typy statusu:

Case Box (Klinika)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Laboratorium)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Filtrowanie według czasu trwania

Możesz filtrować i wyświetlać przypadki, które były ostatnio modyfikowane w ustalonym okresie.

1. Kliknij filtr czasu trwania.



2. Wybrać przedział.

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Wszystko: Pokazuje wszystkie przypadki.
- Przedział niestandardowy: Określ daty początkowe i końcowe, aby wyświetlić przypadki zmodyfikowane w tym okresie.
- Dzisiaj: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane dzisiaj.
- Wczoraj: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane z wczorajszą datą.
- Ostatnie 7 dni: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 7 dni, z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- Ostatnie 30 dni: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni, z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- Ostatnie 90 dni: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 90 dni, z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- Ten miesiąc: Pokaż przypadki z tego miesiąca.
- Poprzedni miesiąc: Pokaż przypadki z poprzedniego miesiąca.

Lista przypadków będzie aktualizowana w czasie rzeczywistym o przypadki utworzone lub ostatnio zmodyfikowane w wybranym okresie.

Filtruj według wyszukiwania

Możesz wykorzystać możliwości wyszukiwania, aby łatwo i szybko wyszukać potrzebne informacje.


Case Name

Case Name / Contains

W zależności od typu konta dostępne są następujące opcje wyszukiwania:

Case Box (Klinika)	Nazwa przypadku, nazwa pacjenta, ID pacjenta, nazwa laboratorium
Work Box (Laboratorium)	Nazwa przypadku, nazwa pacjenta, nazwa kliniki, ID zamówienia

Szczegóły przypadku

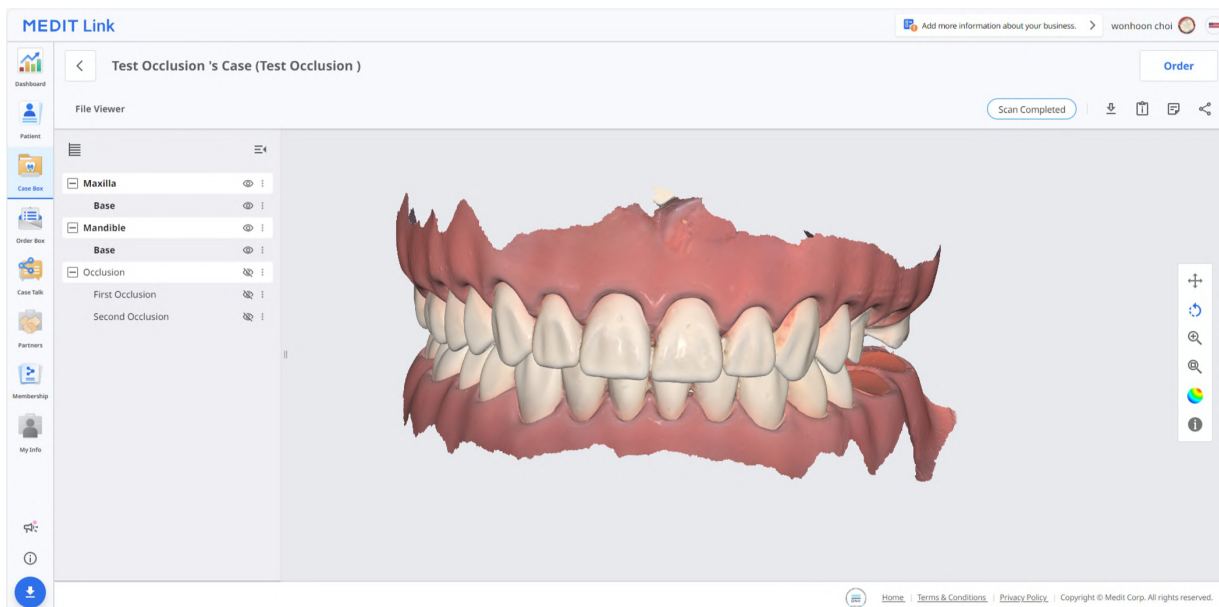

Następujące narzędzia do zarządzania przypadkami są dostępne w Case Box/Work Box.

	Status przypadku	Pokaż status przypadku.
	Przejdź do Order Box/In Box	Zapewnij skrót do tego samego przypadku w innym polu (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Pobierz	Pobierz pliki z przypadku na lokalny komputer stacjonarny.
	Informacje o przypadku	Przejrzyj szczegóły przypadku i zapisz je jako PDF lub wydrukuj.
	Notatki i Tagi	Dodaj notatkę lub tagi podczas rejestracji lub zamawiania przypadku. Wykorzystaj je do przekazania partnerom wszelkich dodatkowych lub uzupełniających informacji o danym przypadku.
	Udostępnij	Utwórz link do udostępniania. Użytkownicy posiadający link udostępniający mogą uzyskać dostęp do danych 3D w przeglądarce internetowej, takiej jak Chrome, Firefox lub Safari, bez konieczności instalowania dodatkowych programów.

Order Box/In Box

Order Box (Clinic) lub In Box (Lab) pokazuje zamówione przypadki w aplikacji Medit Link.

Szczegóły zamówienia

The screenshot shows the 'Occlusion Test's Case' page in the Medit Link application. The page is divided into a left sidebar with navigation icons and a main content area. The main area has a top header with a back arrow, a title 'Occlusion Test's Case (Occlusion Test)', and a 'Cancel Order' button. Below the header, there are two tabs: 'Order' (selected) and 'File Viewer'. The 'Order' tab contains a form with fields for Order ID, Patient Name, Partner Name, Scanned Date, Order Date, Requested Delivery Date, and Expected Delivery Date. The 'File Viewer' tab shows an 'Order List' table with columns: No., Type, Method, Material, and Shade. The table contains four rows of data for Inlay orders.

- | | |
|---|---|
| 1 | Pokaż nazwę przypadku i nazwisko pacjenta. |
| 2 | Udostępnienie funkcji do zarządzania zamówieniami (przyjmowanie/anulowanie; dostarczanie/odbieranie). |
| 3 | Pokaż dostępne zakładki: Zamówienie, Przeglądarka plików |
| 4 | Pokaż funkcje zarządzania przypadkami i plikami: status przypadku, skróty do szczegółowych informacji, informacje o przypadku, notatka & tagi, itp. |
| 5 | Pokaż szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, w tym numer zamówienia, nazwę pacjenta, nazwę partnera, datę skanowania, datę zamówienia, datę dostawy i notatka & tagi. |
| 6 | Pokaż informacje o zamówionym produkcie i statusie dostawy. |


Zakładki w Order Box/In Box

Zamówienie	Przeglądarka plików
Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, takie jak identyfikator zamówienia, nazwisko pacjenta, nazwa konta, data skanowania, data zamówienia, data dostawy, notatka i tagi.	Przeglądaj pliki wygenerowane w wyniku operacji skanowania/CAD. Przeglądarka plików wyświetla i zarządza pozyskanymi lub dołączonymi modelami 3D i obrazami 2D.

Case Talk

Przypadki utworzone w Medit Link mogą być udostępniane konkretnym osobom wskazanym przez Ciebie, każdemu kto posiada udostępniony link lub zarejestrowanym członkom Medit Link.

Użytkownik może zobaczyć listę wszystkich udostępnionych przypadków poprzez "Case Talk" w Medit Link App i Medit Link Web.

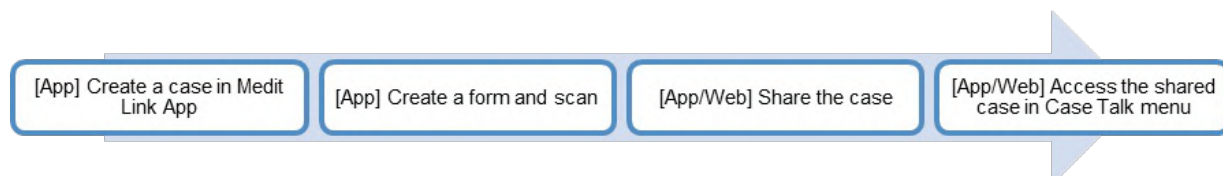


Udostępnione przypadki można przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania osobnego programu, co pozwala na łatwą komunikację za pomocą danych 3D na różnych urządzeniach.


Tworzenie Case Talk

Możesz utworzyć link udostępniający do przypadku, który został utworzony w Case Box/Work Box.

1. Znajdź przypadek, który chcesz udostępnić i kliknij przycisk "Udostępnij" po prawej stronie.

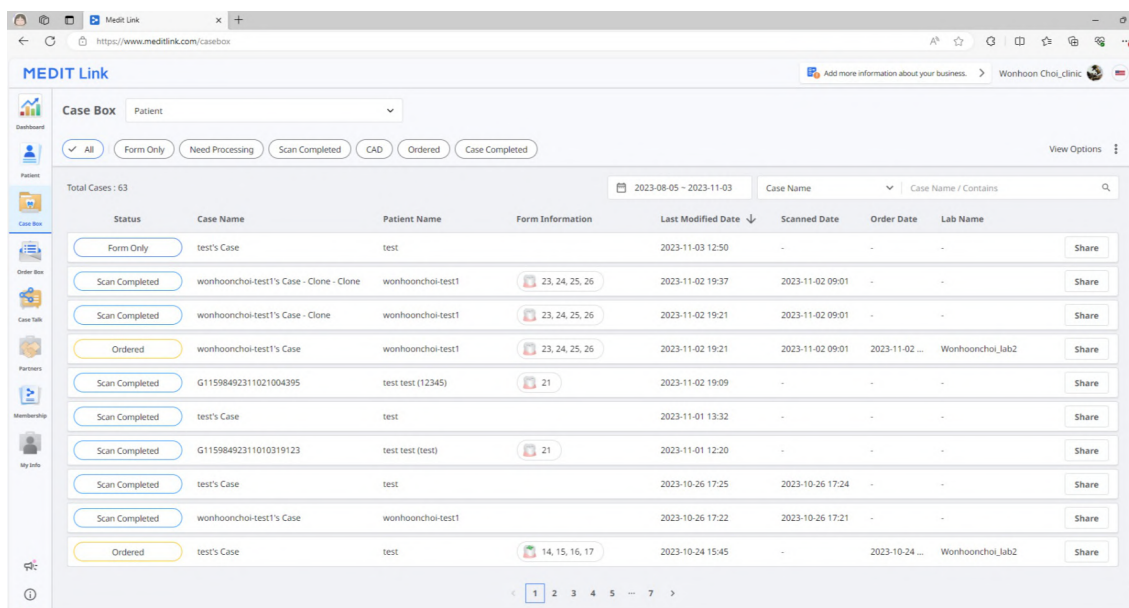

2. Wybierz pliki, które chcesz udostępnić.

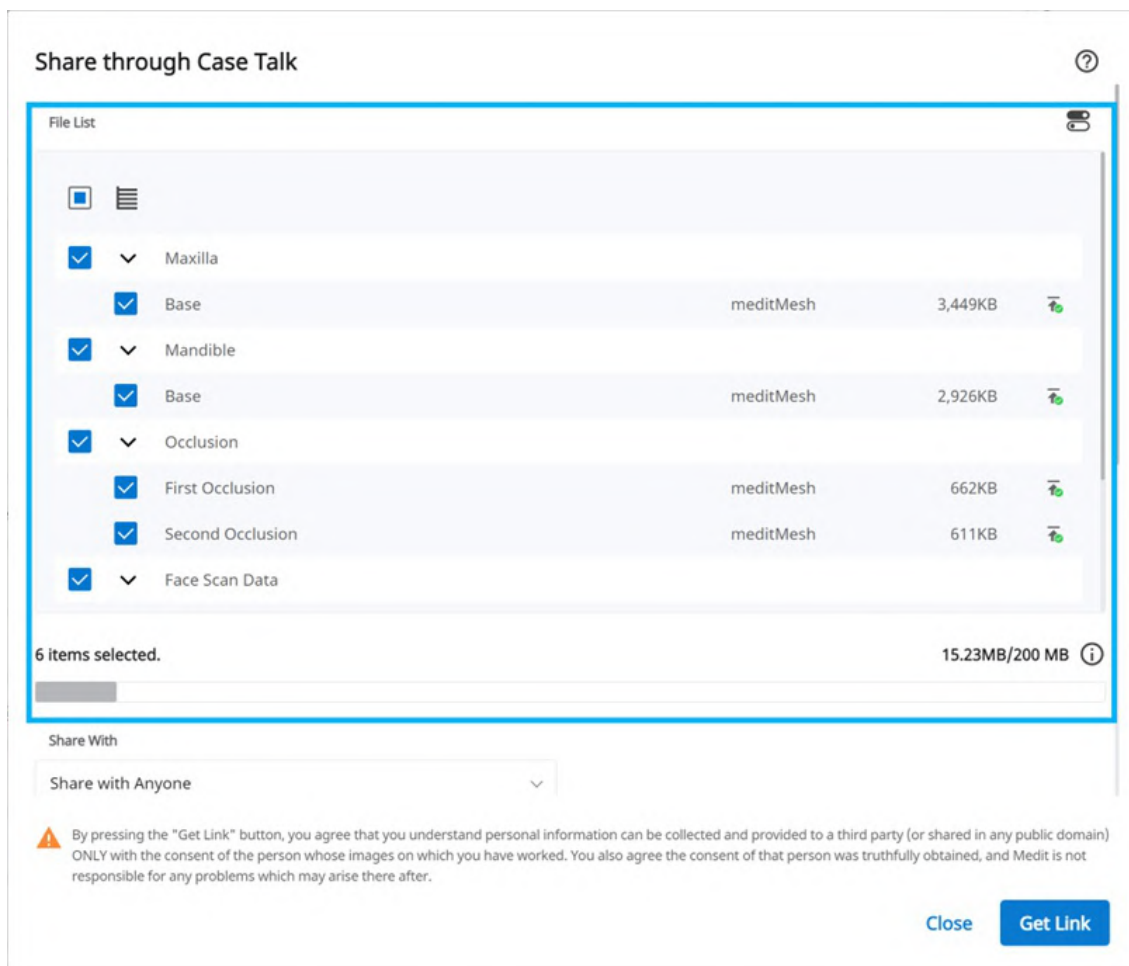

3. Ustaw typ uprawnień do udostępniania i opcje udostępniania.
4. Kliknij "Uzyskaj link", aby utworzyć link udostępniający.

Ustawienie typu uprawnień do udostępniania i opcje udostępniania

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

Share via



PIN Code



PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024



By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close

Get Link

Udostępnij dla	• Udostępnij wszystkim Tworzy link udostępniający. Możesz udostępnić pliki każdemu. • Udostępnij wybranym osobom Tworzy i wysyła link udostępniający do określonych osób.
Udostępnij za pośrednictwem	Jeśli wybierzesz opcję "Udostępnij wybranym osobom", możesz udostępnić link wybranym osobom na różne sposoby. • Adres e-mail • SMS • Partners
Data ważności	Ustaw datę ważności linku. Po wygaśnięciu linku osoby, którym go udostępniłeś, nie będą miały już dostępu do plików. Możesz przedłużyć okres ważności do 90 dni od dzisiaj.
Kod PIN	Ustaw 6-cyfrowy kod dostępu, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.
Udostępnij imię i nazwisko pacjenta	Jeśli zaznaczysz tę opcję, wszystkie osoby posiadające link będą widziały imię i nazwisko pacjenta.
Udzielenie pozwolenia na pobieranie	Jeśli zaznaczysz tę opcję, wszyscy użytkownicy posiadający link mogą pobierać pliki.
Zezwalaj na komentarze	• Jeśli zaznaczysz tę opcję, będziesz mógł komunikować się za pośrednictwem udostępnionego linku. • Jeśli odznaczysz tę opcję, odbiorca będzie mógł jedynie zobaczyć Twoje komentarze, ale nie będzie mógł dodać własnych.
Uwagi	Możesz zostawić wiadomość w sekcji komentarzy.

Szczegóły Case Talk

Można zobaczyć pliki w udostępnionym przypadku. Następujące funkcje są dostępne na stronie szczegółów Case Talk.

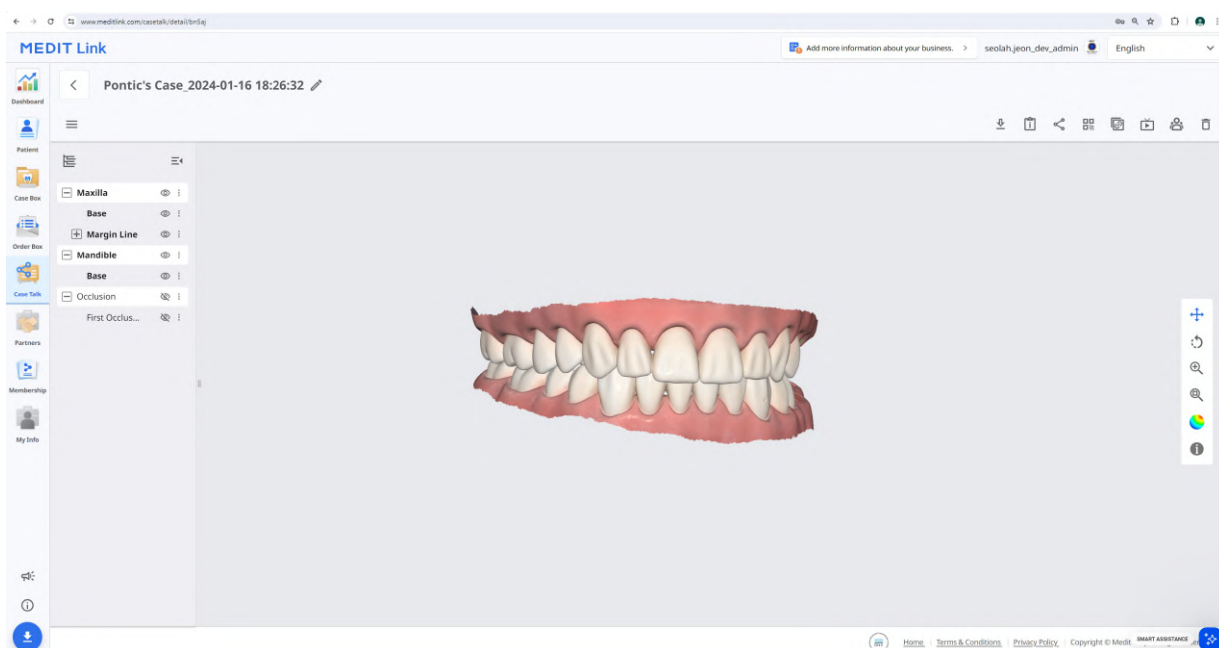

	Pobierz	Pobierz wszystkie pliki z przypadku na lokalny komputer.
	Informacje o przypadku	Pokaż szczegółowe informacje na temat przypadku.
	Udostępnij	Zmodyfikuj ustawienia udostępniania.
	Kod QR	Udostępnij przypadek za pomocą kodu QR.
	Kopiuj link	Kopiuj udostępniony link do schowka. Skopiowany link pokazuje udostępnione pliki w przeglądarce internetowej.
	Na żywo	Udostępnij swój ekran podłączonym użytkownikom. Udostępnianie ekranu jest synchronizowane z połączonymi użytkownikami.
	Uczestnicy	Pokaż wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do udostępnionego łącza.
	Usuń	Usuń udostępniony link. Usunięty link udostępniający nie jest już dostępny.

Uwaga


Poniższe usługi nie są dostępne w Medit Link China.

- Na żywo
- Uczestnicy

Web Viewer

Możesz zobaczyć udostępnione dane poprzez Case Talk w przeglądarce internetowej.

Istnieje możliwość komunikacji z osobami mającymi dostęp do łącza za pomocą adnotacji i komentarzy.

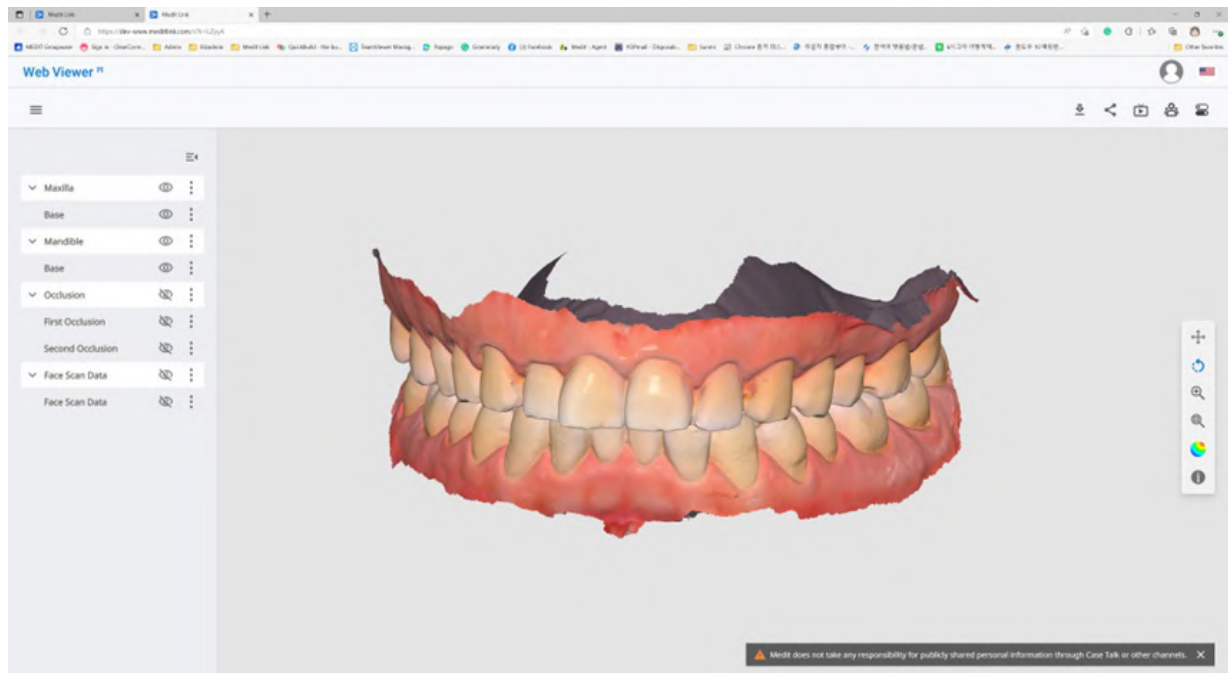

	Pobierz	Pobierz wszystkie pliki z tego przypadku na komputer.
	Informacje o przypadku	Pokaż szczegółowe informacje na temat przypadku.
	Udostępnij	Zmodyfikuj ustawienia udostępniania.
	Kod QR	Udostępnij przypadek za pomocą kodu QR.
	Na żywo	Udostępnij swój ekran podłączonym użytkownikom. Udostępnianie ekranu jest synchronizowane z połączonymi użytkownikami.
	Uczestnicy	Pokaż wszystkich użytkowników, którzy są połączeni z udostępnionym linkiem.
	Oznakowanie zęba	Zmień system znakowania zębów.


Uwaga

Poniższe usługi nie są dostępne w Medit Link China.

- Na żywo
- Uczestnicy

Adnotacja

Możesz dodać adnotacje do określonego miejsca na modelu 3D. Każda osoba posiadająca link może zobaczyć dodane przez Ciebie adnotacje.

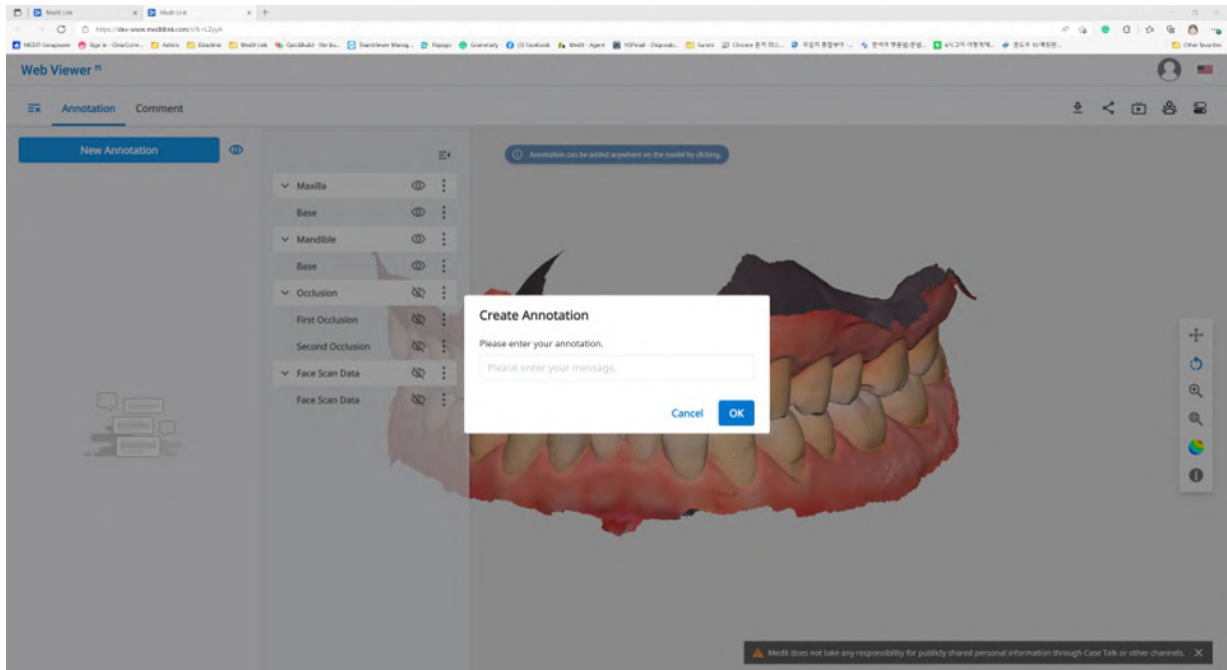


Uwaga


Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link China.

- Adnotacja

1. Znajdź ikonę menu w lewym górnym rogu i wybierz zakładkę "Adnotacja". Użyj przycisku "Nowa adnotacja", aby dodać adnotację w dowolnym miejscu na danych za pomocą kliknięcia.
2. Wpisz wiadomość, a następnie kliknij "OK", aby ją zapisać.

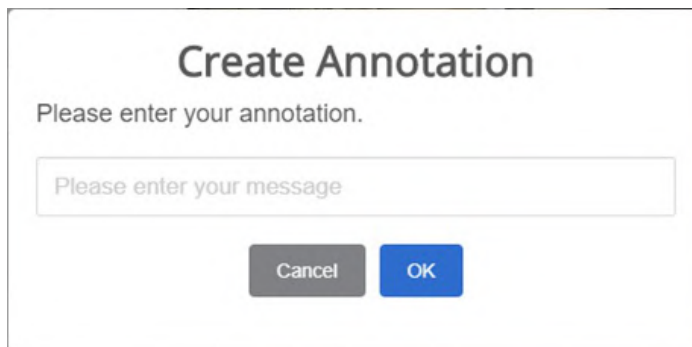A screenshot of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title 'Create Annotation' and a prompt 'Please enter your annotation.' Below this is a text input field with the placeholder 'Please enter your message'. At the bottom are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. Możesz użyć adnotacji jako prostego kanału komunikacyjnego. Kliknij utworzoną adnotację, aby wprowadzić odpowiedź i naciśnij "Wyślij".

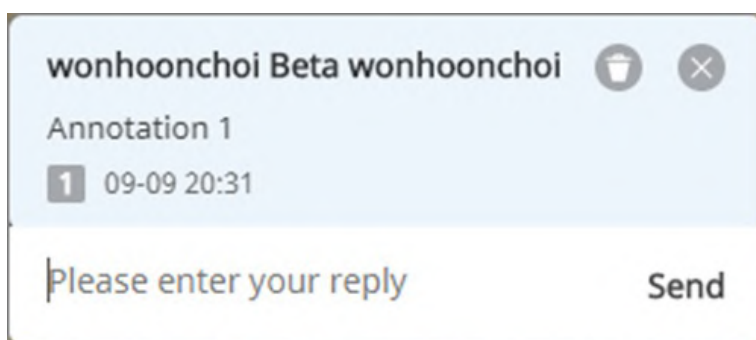A screenshot of the annotation chat interface. It shows a header with the name 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' and icons for deleting and closing. Below is 'Annotation 1' with a timestamp '1 09-09 20:31'. At the bottom is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

Komentarze

Możesz komunikować się z użytkownikami, którzy mają dostęp do linku poprzez zakładkę "Komentarz" w menu Web Viewer.

Uwaga

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link China.

- Uwagi

Udostępnianie ekranu w czasie rzeczywistym

Możesz udostępniać swój ekran w czasie rzeczywistym.

Uwaga

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link China.

- Na żywo

1. Kliknij "Na żywo", aby udostępnić ekran przeglądarki internetowej podłączonym użytkownikom.




2. Kliknij "OK", aby rozpocząć udostępnianie ekranu.
3. Inne osoby, które uzyskały dostęp do linku, muszą zaakceptować udostępnienie ekranu.
4. Ekran użytkownika, który zainicjował udostępnianie ekranu, jest wyświetlany synchronicznie z ekranem osoby, która otrzymała wniosek.


Drzewo danych

Wszystkie dane są grupowane i wyświetlane według atrybutów w drzewie danych. Możesz pokazać lub ukryć dane, dostosować nieprzejrzystość i tak dalej.

Kontrola drzewa danych

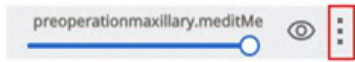Pokaż / Ukryj	Kliknij ikonę "oka", aby pokazać lub ukryć dane z widoku. Kontroluj widoczność danych jako grupy lub pojedynczych plików.
Nieprzejrzyść	Najedź myszką na widoczny element, aby zobaczyć suwak nieprzejrzyśści. Wyreguluj suwak, aby zmienić przejrzyść swoich danych. 
Rozszerzone menu	Rozszerzone menu znajduje się po prawej stronie każdego elementu drzewa danych. Zawiera on następujące opcje:  • Pokaż tylko to: Ukryj wszystkie inne dane poza bieżącymi. • Ukryj: Ukryj bieżące dane.

Kontrola modelu 3D

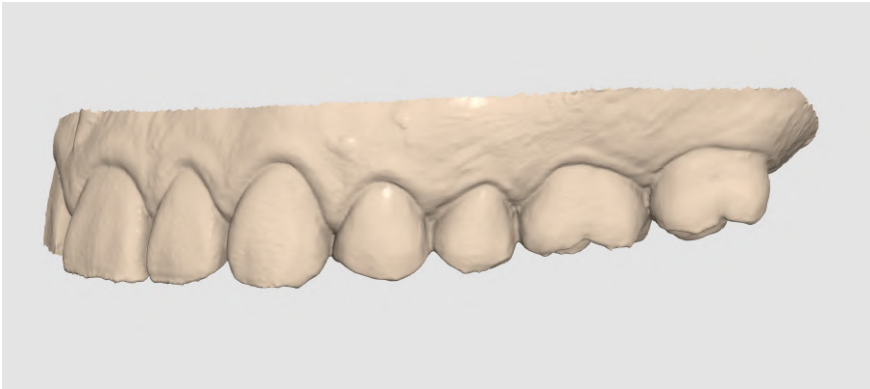↔	Przesuń	Przesuwa model.
↻	Obróć	Obraca model.
⌕	Przybliż/Oddal	Powiększanie i zmniejszanie modelu.
⌕	Dopasuj do ekranu	Ustaw model w centralnym punkcie ekranu.
•	Tryb wyświetlania danych	Zobacz dane w kolorze z matowym wykończeniem (rendering Phong). 
•		Zobacz dane w jednym kolorze. 

Partners

Możesz wyszukać potencjalnych partnerów, aby wnioskować o partnerstwo i wyświetlić listę obecnych partnerów.


Uwaga

Usługi z wykorzystaniem Google Maps nie są dostępne w Medit Link China.

Wyszukiwanie partnerów


Możesz wyszukać użytkowników Medit Link na podstawie nazwy firmy i/lub adresu.

W wynikach wyszukiwania możesz wysłać wniosek o partnerstwo do firmy, z którą chcesz współpracować.

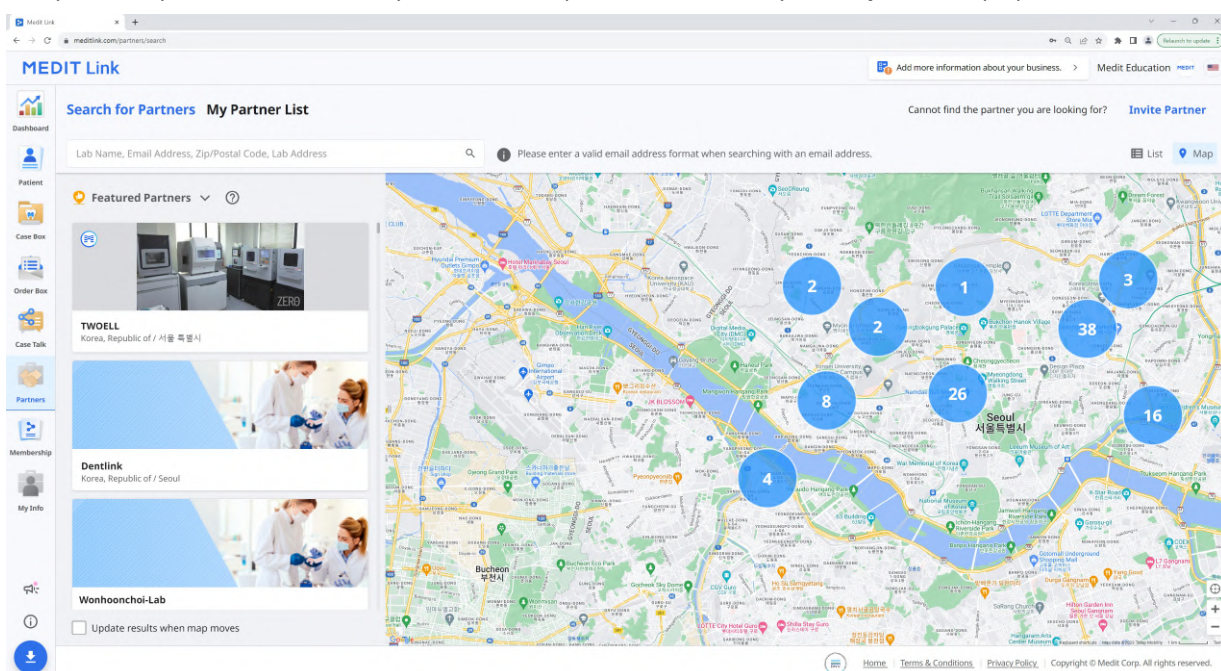

Moja lista partnerów

Możesz przejrzeć swoje bieżące partnerstwa ze wszystkimi istniejącymi firmami partnerskimi na Mojej liście partnerów.

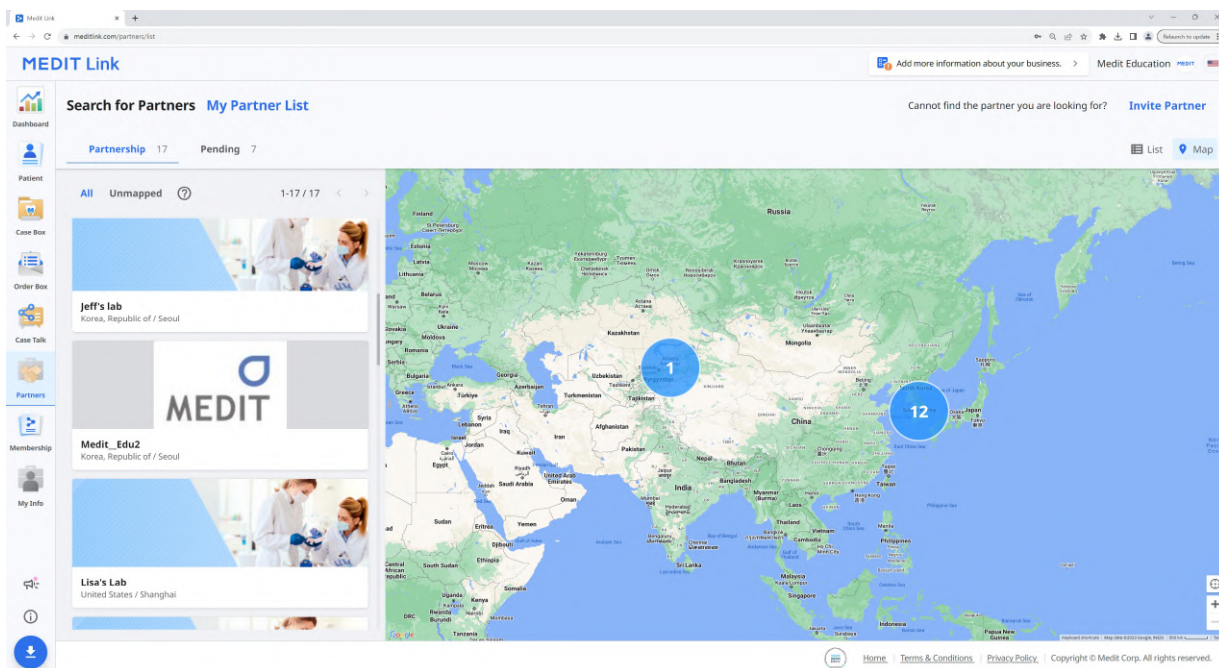

Zaproszenie od partnera

Jeśli masz klinikę lub laboratorium, z którym chcesz współpracować, możesz zaprosić je do Medit Link. Partnerstwo zostanie automatycznie zawiązane po przyjęciu przez nich zaproszenia.

1. Kliknij "Zaproś partnera" w lewym górnym rogu ekranu.
2. Wprowadź adres e-mail firmy, z którą chcesz współpracować i wyślij jej zaproszenie z wnioskiem o partnerstwo.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

3. Po zaakceptowaniu przez zaproszoną organizację zaproszenia i zapisaniu się do Medit Link, partnerstwo zostanie automatycznie nawiązane.

Membership

Członkostwo

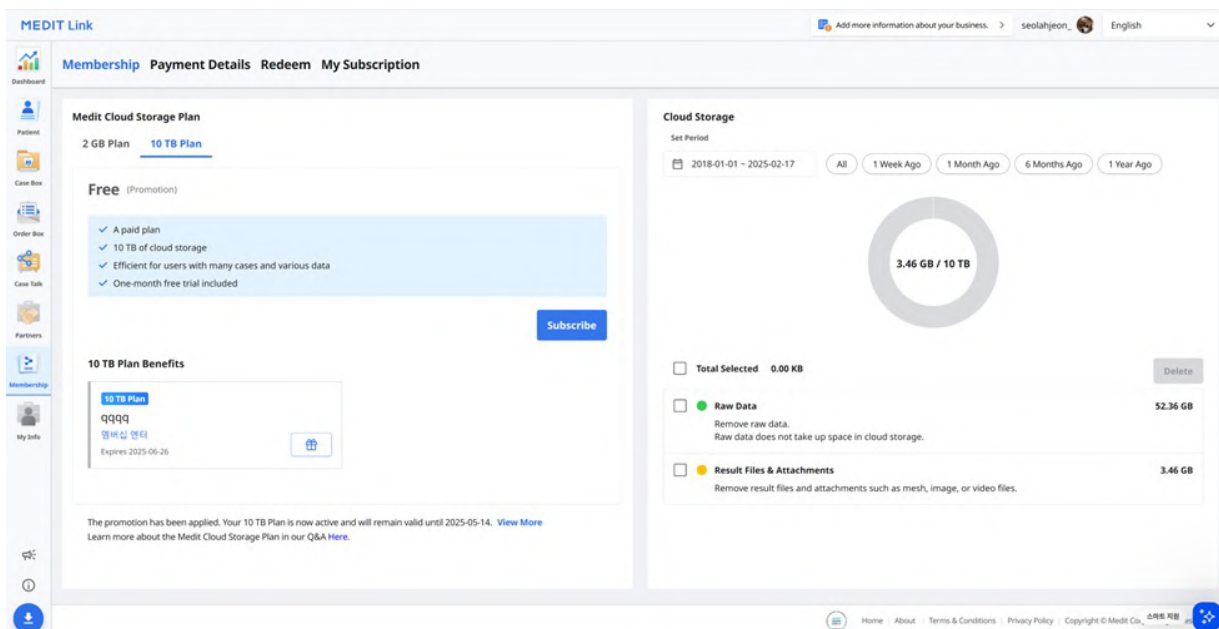

Medit Cloud Storage Plan

Możesz zobaczyć, co oferuje każdy plan, w tym kupony rabatowe i vouchery, a także aktualny status subskrypcji. W dowolnym momencie można uaktualnić plan lub anulować subskrypcję.

MEDIT Link

Dashboard
Patient
Case Box
Order Box
Case Talk
Partners
Membership
My Info

Membership
Payment Details
Redeem
My Subscription

Medit Cloud Storage Plan
2 GB Plan
10 TB Plan

Free (Promotion)

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

10 TB Plan Benefits

2 GB Plan

AI Crown | Redefine Your Performance

Dentbird by Imagoworks

Expires 2025-06-30

The promotion has been applied. Your 10 TB Plan is now active and will remain valid until 2025-05-14. [View More](#)
Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Medit Link oferuje następujące plany przechowywania danych w chmurze:

2 GB Plan

- Bezpłatny plan standardowy dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników
- 2 GB pamięci w chmurze
- Dla nowych użytkowników

10 TB Plan

- Plan płatny
- 10 TB pamięci w chmurze
- Dla użytkowników z wieloma przypadkami i różnymi danymi
- Miesiąc bezpłatnego okresu próbnego


	2 GB Plan	10 TB Plan
Przechowywanie w chmurze	2 GB	10 TB
Opłata miesięczna	Bez opłat	9,99 USD/miesiąc
* Przechowywanie w chmurze nie wlicza danych nieprzetworzonych do wykorzystanej przestrzeni.		

Uwaga

Plany członkowskie będą dostępne na Medit Link China. Z opcji 10 TB Plan można korzystać za darmo do czasu oficjalnego udostępnienia tej funkcji.

Przechowywanie w chmurze

W sekcji po prawej stronie możesz zarządzać swoją przestrzenią do przechowywania w chmurze.

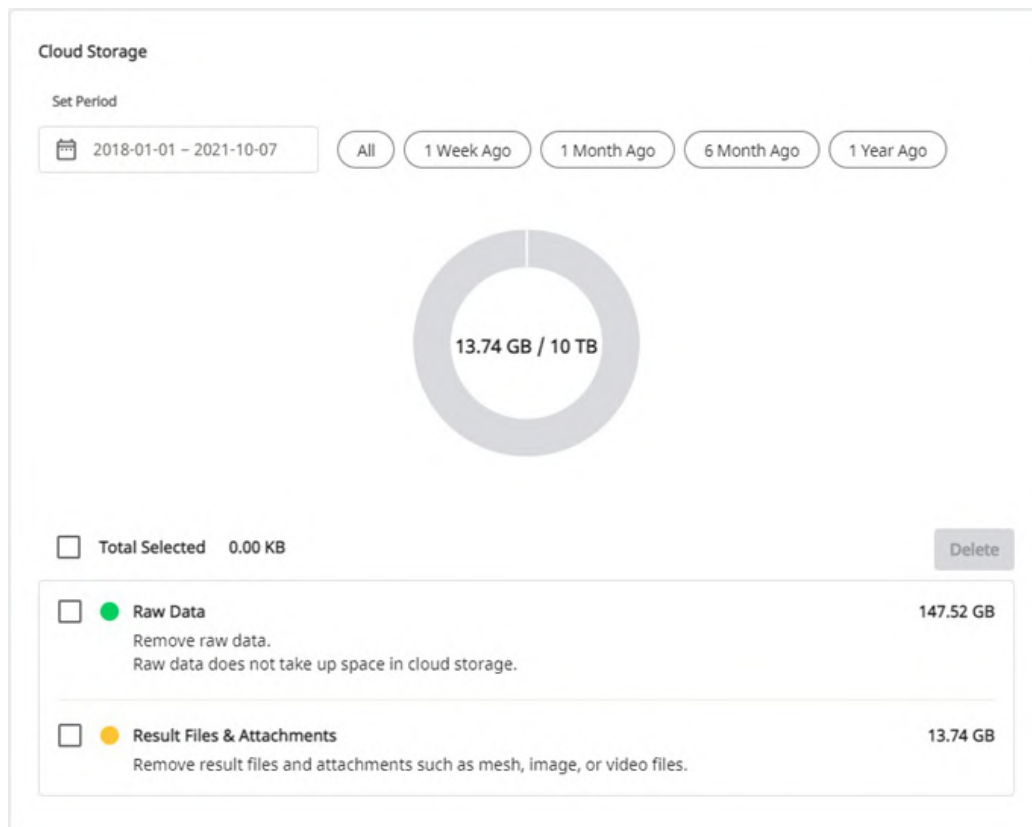

Ustaw okres	Ustaw konkretny okres, aby usunąć dane utworzone w tym przedziale czasowym. • Wszystkie: Zobacz wszystkie pliki. • 1 Tydzień temu: Zobacz pliki, dla których minął tydzień od utworzenia. • 1 Miesiąc temu: Zobacz pliki, dla których minął miesiąc od utworzenia. • 6 Miesięcy temu: Zobacz pliki, dla których minęło sześć miesięcy od utworzenia. • 1 Rok temu: Zobacz pliki, dla których minął rok od utworzenia.
Dane nieprzetworzone	Dane nieprzetworzone nie zajmują miejsca przy przechowywaniu w chmurze, więc nie będzie ich na wykresie pi-chart. Ale możesz zarządzać danymi nieprzetworzonymi z tego miejsca w razie potrzeby, np. Usunąć je, aby chronić prywatne informacje pacjenta.
Wynik & Załącznik	Pliki wyników i załączników zajmują miejsce w chmurze. Jeśli chmura jest pełna, możesz zapewnić sobie więcej miejsca na dysku, usuwając niepotrzebne pliki.
Usuń	Usuń wybrane pliki z pamięci masowej w chmurze, aby zwolnić miejsce.

Subskrybuj

Jeśli obecnie korzystasz z opcji 2 GB Plan lub 10 TB Plan z kodem realizacji, możesz subskrybować opcję 10 TB Plan.

Płatność jest realizowana za pośrednictwem usługi Stripe (www.stripe.com).

1. Przejdź do sekcji Membership > Medit Cloud Storage Plan > 10 TB Plan i kliknij przycisk „Subskrybuj”.

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan **10 TB Plan**


Free (Promotion)

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

2. Sprawdź opis opcji 10 TB Plan i ponownie kliknij przycisk „Subskrybuj”.

Subscribe Membership

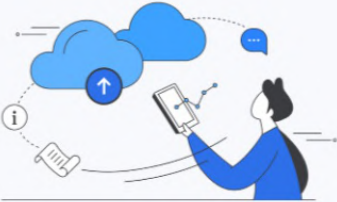

10 TB Plan

9.99\$ USD / Monthly

- ✓ Subscribe now to keep your 10 TB Plan after the promotion expires.
- ✓ You will pay a subscription fee after the current promotion expires. If you don't wish to pay, you can unsubscribe before payment.

* VAT is not included.
* Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Cancel **Subscribe**

3. Sprawdź cenę i warunki oraz wprowadź informacje niezbędne do dokonania płatności. Następnie kliknij "Subskrybuj".

←

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00

Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

Medit Cloud Storage Plan

Billed daily

\$9.99

Subtotal

\$9.99

1 Month Free for New Subscribers

- \$9.99

100% off for a day

Tax ⓘ

\$0.00

Total due today

\$0.00

Pay with card

Email

yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

VISA

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by stripe

Terms

Privacy

4. Płatność może zająć kilka sekund. Po zakończeniu zobaczysz wiadomość z potwierdzeniem.

Subscribe Membership



Payment Successful.

Invoice


Close

Anuluj subskrypcję

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. Po anulowaniu można nadal korzystać z opcji 10 TB Plan przez pozostały okres opłaconego miesiąca. Twój plan zostanie zmieniony na opcję 2 GB Plan od następnego dnia płatności, a przestrzeń dyskowa w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Jeśli pojemność magazynu w chmurze zostanie przekroczona, pliki nie będą tworzone w kopii zapasowej, a funkcje zamawiania i udostępniania nie będą dostępne.

1. Kliknij "Anuluj subskrypcję".
2. Kliknij "Anuluj subskrypcję".

Cancel Subscription

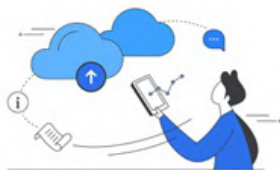

Are you sure you want to cancel your **10 TB Plan**?

✓ By confirming, you will automatically be switched to the free 2 GB Plan.
Enjoy full access to the features and storage of your current plan through to 2025-02-20.

ⓘ Please note that all uploaded files will be retained regardless of the plan you choose.
If your storage exceeds the 2 GB limit, you won't be able to upload new files.

*Click [here](#) to learn more about our membership plans.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

3. Aby potwierdzić, że chcesz anulować subskrypcję, kliknij ponownie "Anuluj subskrypcję" w nowym oknie wyskakującym.

Confirm Subscription Cancellation

Your subscription will be canceled on 2025-02-20.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

4. Twoja subskrypcja została anulowana.

Confirm Subscription Cancellation


Your subscription has been canceled.
You can use your current plan until 2025-02-20. After that, the cloud capacity will be limited to 2 GB.
If the used space exceeds the limit, data will not be backed up, and functions such as Order and Share will not be available.

Close

5. Twój plan zostanie zmieniony na opcję 2 GB Plan od następnego dnia płatności, a przestrzeń dyskowa w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Jeśli pojemność magazynu w chmurze zostanie przekroczona, pliki nie będą tworzone w kopii zapasowej, a funkcje zamawiania i udostępniania nie będą dostępne.

Moja subskrypcja

Możesz wyświetlić szczegóły swojej bieżącej subskrypcji, subskrybować ją ponownie lub anulować w sekcji Moja subskrypcja. Możesz także zmienić metodę płatności, która będzie stosowana począwszy od następnej zaplanowanej płatności.

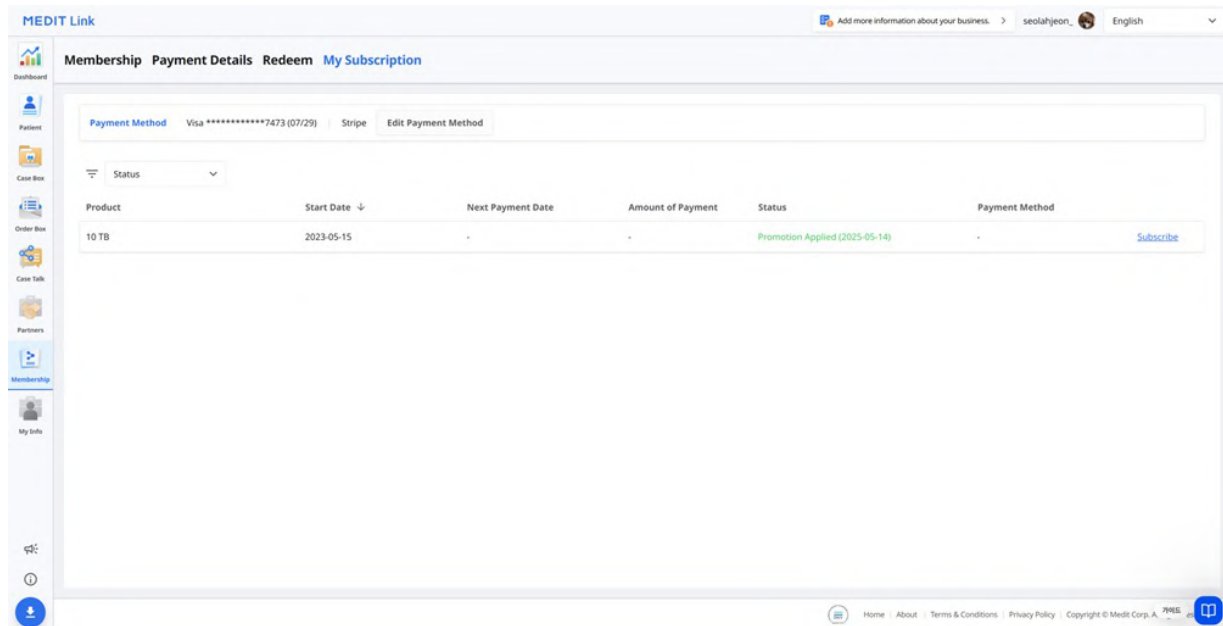

Szczegóły


Pozycja	Opis
Produkt	Wyświetla typ subskrypcji.
Data rozpoczęcia	Wyświetla od kiedy rozpoczęła się subskrypcja lub promocja.
Następny termin płatności	Wyświetla datę następnej płatności.
Kwota płatności	Wyświetla kwotę płatności.
Status	Subskrypcja - Aktywny: Subskrypcja jest aktywna. - Wygasta: Subskrypcja nie zostanie odnowiona w dniu następnej płatności i zostanie anulowana. - Wygasta: Subskrypcja została zakończona. Promocja - Zastosowano promocję: Kod promocyjny jest teraz aktywny. - Promocja w oczekiwaniu: Kod promocyjny oczekuje na aktywację. - Promocja wygasta: Kod promocyjny stracił ważność.
Metoda płatności	Wyświetla cztery ostatnie cyfry karty użytej do płatności.

Subskrybuj ponownie


Pozycja	Opis
Plan przechowywania danych w chmurze	Kliknij przycisk subskrypcji, aby ponownie subskrybować opcję 10 TB Plan.
Plan subskrypcji aplikacji	Zaloguj się do aplikacji, aby ponownie subskrybować.

Jak dodać metodę płatności

1. Kliknij "Edytuj metodę płatności".

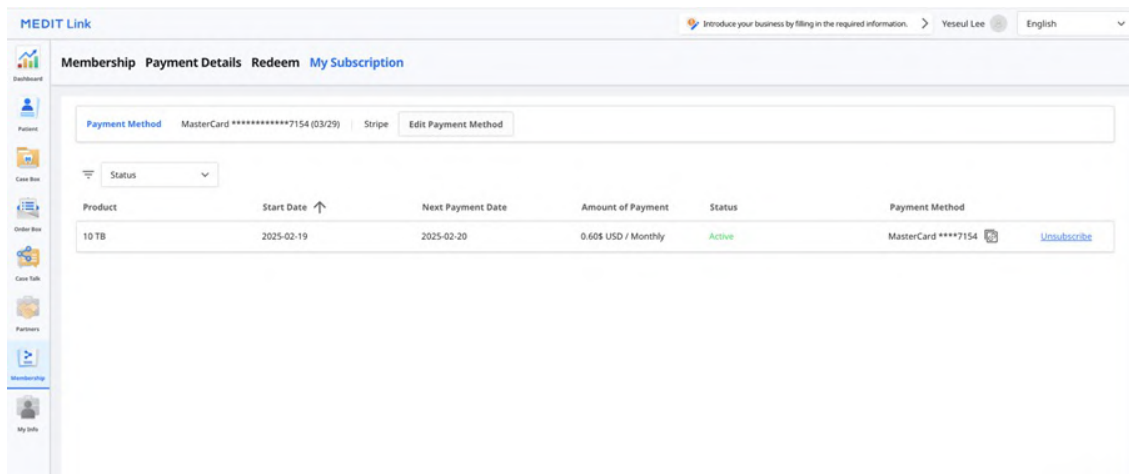

2. Kliknij "Dodaj metodę płatności".

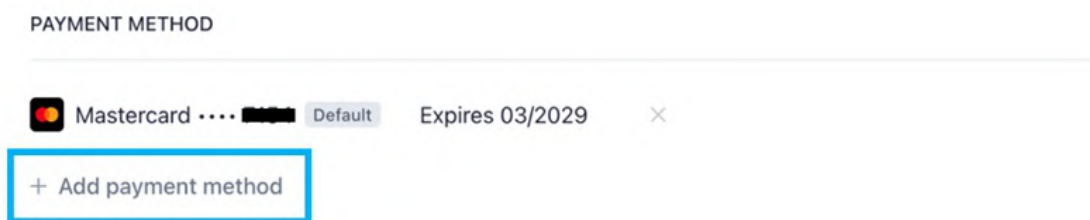

3. Wprowadź wymagane informacje i kliknij "Dodaj".

Add payment method

Card number

1234 1234 1234 1234

Expiry date

MM / YY

Security code

CVC

Country

South Korea

By providing your card information, you allow MEDIT USA Inc to charge your card for future payments in accordance with their terms.

☒ Use as default payment method

Add

Go back

4. Nowo dodany sposób płatności zostanie ustawiony jako domyślny i użyty przy następnej płatności.

PAYMENT METHODS



Jak zmienić metodę płatności

1. Kliknij ikonę rozwiniętego menu obok metody płatności, którą chcesz zmienić w oknie dialogowym rozliczeń.

PAYMENT METHODS



2. Kliknij "Ustaw jako domyślną", aby ustawić wybraną kartę jako domyślną metodę płatności.


CURRENT SUBSCRIPTION

[DEV] Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics
\$9.99 per day

[View details](#) ▾

Your subscription renews on February 20, 2025.

PAYMENT METHODS

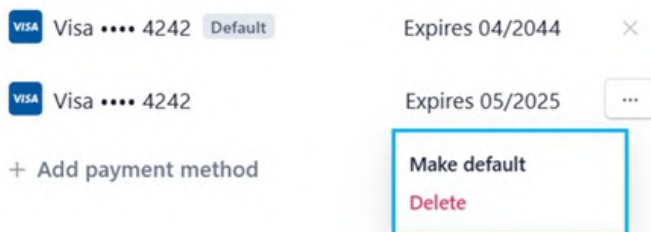

Zrealizuj

Możesz zrealizować kod promocyjny, aby uzyskać dostęp do opcji 10 TB Plan za darmo.

Szczegóły

MEDIT Link
Add more information about your business.
seolah.jeon_dev_admin
English

Membership
Payment Details
Redeem
My Subscription

Register Redeem Code
Register

Redeem Code
All

	Product	Promotion	Code Number	Registration Date	From	To	Status	
4	Premium	4 Clinic Premium Promotion	2A6F-0125-6747-4AB7	2022-03-16	2021-10-01	2021-10-05	Waiting	Cancel

1

Home
About
Terms & Conditions
Privacy Policy
Copyright © Medit Corp.
GUIDES

Pozycja	Opis
Produkt	Wyświetla plan, do którego zastosowano promocję.
Promocja	Wyświetla nazwę promocji.
Numer kodu	Wyświetla numer kodu.
Data rejestracji	Wyświetla datę zarejestrowania kodu.
Od	Wyświetla datę rozpoczęcia promocji.
Do	Wyświetla datę upływu ważności promocji.
Status	- Registered: Kod promocyjny został dodany i jest już dostępny. - Waiting: Kod promocyjny oczekuje na aktywację. - Activated: Kod promocyjny jest teraz aktywny. - Used: Kod promocyjny stracił ważność.

Zarejestruj Kod Realizacji

- Wprowadź kod realizacji i kliknij "Zarejestruj".
- Przeczytaj zawiadomienie i wybierz "Zarejestruj" lub "Zastosuj" w wyskakującym oknie dialogowym.
 - Zarejestruj:** Zarejestruj kod realizacji. Możesz aktywować i wykorzystać kod realizacji później po rejestracji.
 - Zastosuj:** Zarejestruj i aktywuj kod realizacji. Rabat promocyjny obowiązuje natychmiast.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
Periodic payments are stopped automatically.

CloseRegisterApply

Aktywuj Kod realizacji

Możesz zarejestrować wiele kodów realizacji, ale musisz aktywować ten, który chcesz wykorzystać.

1. Kliknij przycisk "Aktywuj" obok kodu, którego chcesz użyć.
 - Jeśli nie ma kodu o statusie "Activated", wybrany kod zostanie zastosowany natychmiast.
 - Jeśli istnieje już aktywowany kod, nowo wybrany kod zmieni status na "Waiting". Gdy aktualnie aktywowany kod realizacji wygaśnie, nowy kod realizacji w stanie "Waiting" zostanie automatycznie aktywowany.

Uwaga

Tylko jeden kod realizacji może zostać aktywowany i tylko jeden może mieć status "Waiting".


Szczegóły płatności

Możesz wyświetlić historię subskrypcji i płatności w zakładce Szczegóły płatności.

Pozycja	Opis
Termin płatności	Wyświetla datę płatności.
Produkt	Wyświetla zakupiony plan lub aplikację.
Typ płatności	Wyświetla typ płatności: • Subskrypcja • Płatność jednorazowo
Czas trwania	Wyświetla okres subskrypcji.
Szczegóły	Wyświetla szczegółowe informacje o płatności.
Kwota płatności	Wyświetla koszt subskrypcji lub jednorazowego zakupu.
Status	• Payment Completed: Płatność została przetworzona. • Payment Failed: Płatność nie została przetworzona. • Payment Incomplete: Płatność nie została zrealizowana. Kliknij „Zapłać teraz”, aby kontynuować. • Oczekiwanie: Oczekiwana jest płatność za odnowienie subskrypcji.

[Zobacz szczegóły rachunku](#)

Możesz wyświetlić faktury i pokwitowania płatności, klikając ikonę pokwitowania po prawej stronie.

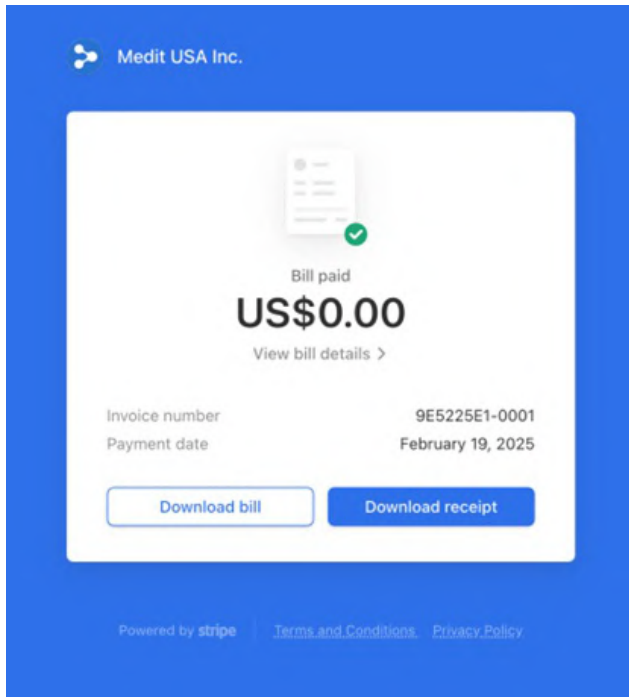

Kliknij „Wyświetl szczegóły rachunku”, aby wyświetlić szczegóły płatności.

× Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target	yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source	Medit USA Inc.
bill	#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025	
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics Quantity 1 piece	US\$0.60
subtotal	US\$0.60
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)	-US\$0.60
Payment amount	US\$0.00
Amount paid	US\$0.00
Remaining amount	US\$0.00

Do you have any questions?[Contact Medit USA Inc.](#)

My Info

Moje konto

W sekcji Moje informacje możesz przeglądać i edytować informacje podane podczas rejestracji oraz sprawdzać swój status członkostwa.

← → ↻ 🔍 www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info

My Account My Clinic My Scanner



Email Address

seolah.jeon@medit.com

Change Email Address

Password

Change Password

Name

seolah.jeon_dev_admin

Language

English

Country/Region

Korea, Republic of

 Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Moja klinika/Moje laboratorium (tylko konto administratora)

Możesz przeglądać i edytować informacje o swojej klinice lub laboratorium. Ta sekcja jest dostępna tylko dla kont administratorów.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info


My Account **My Clinic** My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

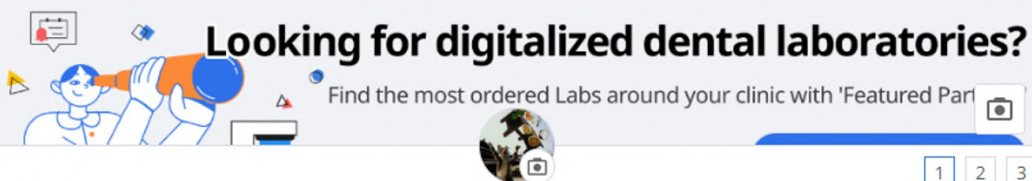

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'

1

2

3

Services

Select

▼

Specialties (choose up to 3)

Select

▼

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Mój skaner

Możesz sprawdzić informacje o podłączonym urządzeniu dla danego konta.

MEDIT Link

Dashboard

Patients

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Home

About

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © 2024

TRUBLESHOOTING

Add more information about your business.

seolahjeon_

English

My Account

My Clinic

My Scanner

No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Date	Days L... ⓘ	Status ⓘ	
1	i700	AZ2105102619	Od 18h 44m	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26	Expired	Unregistered	Buy ⓘ
2	i700	AZ2105102622	Od 18h 39m	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08	Expired	Unregistered	Buy ⓘ
3	i700	AZ2305100410	Od 6h 38m	2025-03-06 09:52	2024-09-05 14:23	-	-	-	Registered	Buy ⓘ
4	i600	BG2202100001	Od 0h 58m	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2022-10-30	2023-10-29	Expired	Unregistered	Buy ⓘ
5	i600	BG2202100026	Od 8h 32m	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-	-	Unregistered	Buy ⓘ
6	i600	BG2202100029	Od 2h 38m	-	2022-06-16 11:58	-	-	-	Unregistered	Buy ⓘ
7	i900	CA2405100106	Od 11h 46m	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-	-	Unregistered	Buy ⓘ

ⓘ The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Pozycja	Opis
Typ	Wyświetla nazwę modelu.
Numer seryjny	Wyświetla numer seryjny urządzenia.
Czas użytkowania	Wskazuje, jak długo urządzenie było używane.
Status	Wyświetla status rejestracji urządzenia: „Zarejestrowany” oznacza, że skaner został pomyślnie podłączony i zarejestrowany. „Niezarejestrowany” oznacza, że skaner nie jest już zarejestrowany. Jeśli skaner zostanie zarejestrowany w innej grupie, utraci rejestrację w bieżącej grupie.
Ostatnio połączony	Wyświetla datę ostatniego połączenia.
Ostatnio skalibrowany	Wyświetla datę ostatniej kalibracji.
Data rozpoczęcia gwarancji	Wyświetla datę aktywowania gwarancji.
Data wygaśnięcia gwarancji	Wyświetla datę wygaśnięcia gwarancji.
Pozostało dni	Wyświetla liczbę dni pozostałych do wygaśnięcia gwarancji.
Kup	Umożliwia użytkownikowi zakup i przedłużenie gwarancji.
Ikona Usurń	Umożliwia użytkownikowi usunięcie skanera z listy.

Pozostałe menu

Powiadomienie & Aktualizacja

Możesz sprawdzić ważne powiadomienia od firmy Medit oraz aktualizacje programu Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Powiązane strony internetowe

Możesz uzyskać różne informacje na temat korzystania z Medit Link. Uzyskaj dostęp do zasobów edukacyjnych i informacyjnych Medit, takich jak Medit Academy, Medit Academy YouTube i Centrum pomocy Medit.

63

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >



Help Center >

Pobierz Medit Link App

Możesz pobrać z sieci najnowszą wersję instalatora programu. To menu jest pomocne w przypadku utraty instalatora dostarczonego w pakiecie z produktem lub posiadania nieaktualnego instalatora.

Uwaga

Medit Link aktualizuje się automatycznie, gdy masz połączenie z internetem.



Windows

macOS

Omówienie

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Pasek tytułowy	Odnieś się do Medit Link App > Pasek tytułowy , aby uzyskać szczegółowe informacje.
2	Menu	Odnieś się do Medit Link App > Menu , aby uzyskać szczegółowe informacje.
3	Narzędzia i funkcje	Odnieś się do Medit Link App > Przeglądarka plików i Medit Link App > Przeglądaj opcje w celu uzyskania szczegółowych informacji.
4	Lista przypadków	Odnieś się do Medit Link App > Filtrowanie i wyszukiwanie w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Poniższa tabela podsumowuje menu dostępne w każdym typie konta kliniki i laboratorium.

Typ konta		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Konta kliniki	Administrator	O	O	O	X	X	O	O	O
	Członek	O	O	O	X	X	O	O * Tylko funkcja przywracania	O
Konta laboratorium	Administrator	X	X	X	O	O	O	O	O
	Członek	X	X	X	O	O	O	O * Tylko funkcja przywracania	O

Pasek tytułowy

Pasek tytułowy zapewnia szybki dostęp do funkcji, takich jak informacje o koncie, powiadomienia, zawiadomienia i aktualizacje, ustawienia i stan sieci.



Moje informacje

Moje informacje zawierają podstawowe informacje o użytkowniku, takie jak zdjęcie profilowe, nazwa kliniki lub laboratorium, adres e-mail i nazwa użytkownika.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Powiadomienia

Możesz zobaczyć powiadomienia związane z partnerstwami, zamówieniami i procesami roboczymi.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

1	Zaznacz pole, aby pokazywać tylko nieprzeczytane wiadomości.
2	Kliknij dowolne powiadomienie, aby natychmiast przejść do powiązanego przypadku lub strony internetowej.

Powiadomienie i aktualizacja

Możesz sprawdzić ważne powiadomienia od firmy Medit oraz aktualizacje programu Medit.

Ustawienia

Okno dialogowe Ustawienia umożliwia użytkownikom konfigurację programu.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI
☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Please apply changes.

Apply

Prosimy odnieść się do [Medit Link App > Ustawienia](#) w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji ustawień.

Status sieci

Medit Link umożliwia płynne korzystanie ze wszystkich funkcji po podłączeniu do sieci.

Aby ułatwić sprawdzanie stanu połączenia sieciowego w czasie rzeczywistym, na pasku tytułu wyświetlana jest ikona stanu sieci.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Jeśli połączenie sieciowe nie jest dobre, mogą wystąpić następujące ograniczenia:

- Niektóre funkcje będą ograniczone, takie jak zamawianie przypadku, tworzenie przypadku, udostępnianie za pośrednictwem Case Talk i synchronizacja w chmurze.
- Ogólna wydajność usługi może być zmniejszona ze względu na wpływ środowiska sieciowego.

W takim przypadku można wejść w tryb Offline, aby wykonać podstawowe zadania, a następnie skorzystać z funkcji wymagających internetu po uzyskaniu połączenia.

Uwaga

Symbol sieci wskazuje szybkość reakcji między bieżącym obszarem a AWS (Amazon Web Service). Nie oznacza to prędkości sieci, więc czasami może pokazać status jako słaby lub zły, nawet jeśli prędkość sieci jest wystarczająco duża.

Jeśli inny proces używa tej samej sieci, prędkość może pokazać się jako słaba lub zła, a ogólna wydajność Medit Link może być zła. W takiej sytuacji prosimy nie udostępniać sieci innym procesom.

Na przykład funkcja "Prześlij nieprzetworzone dane" jest ogromną częścią procesu sieciowego. Jeśli symbol pokazuje słaby lub zły stan, przejdź do Ustawienia > Prześlij nieprzetworzone dane i wyłącz "Prześlij automatycznie".

Ustawienia

Ogólne

Udostępnia opcje dotyczące ogólnej konfiguracji systemu.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI

☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

Zapisz folder	Określić folder do przechowywania wyników danych wygenerowanych w Medit Link i podłączonych programach.	
Folder instalacji aplikacji	Określ ścieżkę instalacji aplikacji Medit Apps i aplikacji partnerskich dostępnych w App Box.	
Ustawienia językowe	Wybierz język dla programu.	
Oznakowanie zębów	Wybierz system oznakowania zębów pomiędzy FDI i US.	
Powiadomienia	Po zaznaczeniu będziesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach programu.	
Prześlij nieprzetworzone dane	Po zaznaczeniu, dane nieprzetworzone są automatycznie przesyłane do chmury. Pomaga to w tworzeniu kopii zapasowej danych oryginalnych i wykonywaniu bezproblemowego skanowania podczas korzystania z Medit Link z tym samym kontem na innym komputerze. Kopia zapasowa w chmurze danych oryginalnych dotyczy tylko danych pozyskanych w Medit Scan for Clinics.	
Szybkie skanowanie	Wybierz, czy chcesz, aby poniższe fazy skanowania były automatycznie wyświetlane w Medit Scan for Clinics bez konieczności wypełniania informacji w formularzu. • Przed-op dla Szczęki • Przed-op dla Żuchwy • Skan twarzy	
Opcje przeglądania	Zaawansowane renderowanie	Po zaznaczeniu, model 3D jest wyświetlany w bardziej żywym i realistycznym renderowaniu.
	Dostosuj teksturę koloru	Dostosuj jasność modelu 3D. * Wynikowe kolory mogą nieznacznie różnić się od Medit Link w przypadku otwarcia tych samych danych za pomocą innego oprogramowania.
Program poprawy doświadczeń użytkowników Medit	Dołącz do programu poprawy doświadczeń użytkowników Medit. • Zebrane informacje wykorzystujemy do udoskonalania naszych produktów i usług. • Nie gromadzimy żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób.	
Strona domyślna po zalogowaniu	Wybór domyślnego menu wyświetlanego podczas uruchamiania programu. • Konta klinik mogą wybierać między Patient i Case Box • Konta laboratorium mogą wybierać między In Box i Work Box	

Zarządzanie pamięcią masową

Sprawdzaj i zarządzaj przestrzenią pamięci masowej lokalnej i w chmurze.

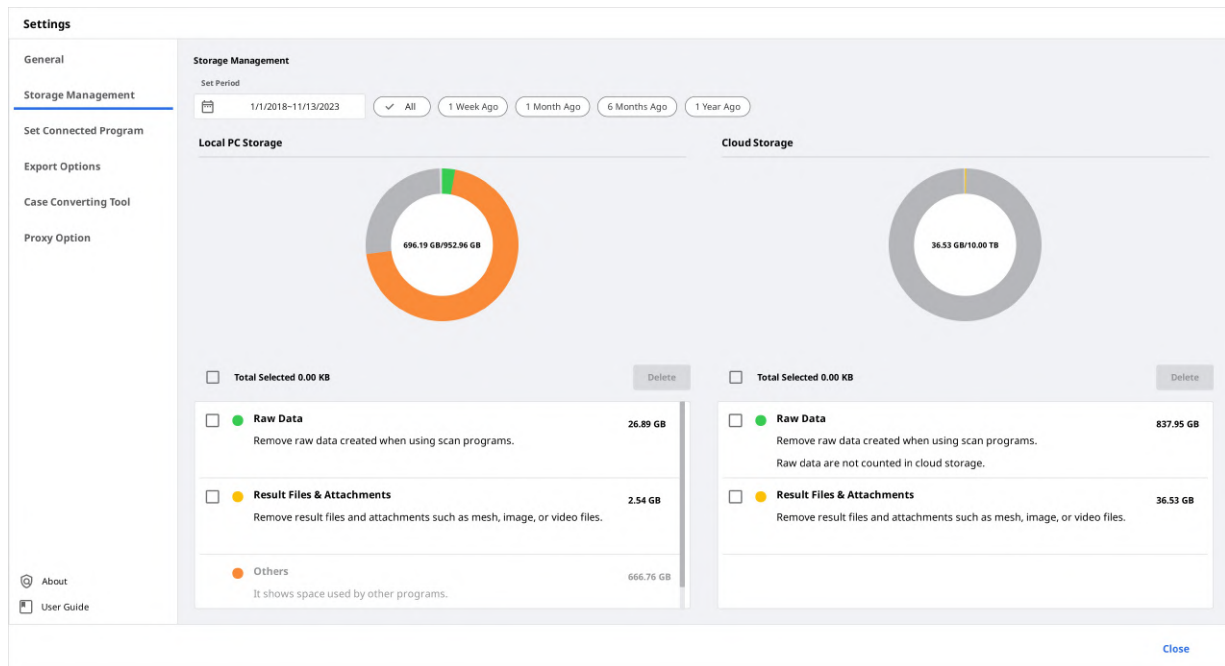

Ustaw okres

Ustaw konkretny okres, aby usunąć dane utworzone w poniższych ramach czasowych.

- Wszystkie: Zobacz wszystkie pliki.
- 1 Tydzień temu: Zobacz pliki, dla których minął tydzień od utworzenia.
- 1 Miesiąc temu: Zobacz pliki, dla których minął miesiąc od utworzenia.
- 6 Miesięcy temu: Zobacz pliki, dla których minęło sześć miesięcy od utworzenia.
- 1 Rok temu: Zobacz pliki, dla których minął rok od utworzenia.

Lokalna pamięć masowa

Zarządzaj przestrzenią dyskową komputera.

Dane nieprzetworzone	Usuń wybrane dane nieprzetworzone z komputera. Jeśli dane nieprzetworzone są już przesłane do chmury, możesz je pobrać i wykorzystać, kiedy tylko chcesz.
Wynik & Załącznik	Usuń z komputera pliki wyników i załączników, takie jak siatki, obrazy i wideo. Jeśli te pliki są już przesłane do chmury, możesz je pobrać i użyć, kiedy tylko chcesz.
Inne	Zobacz pliki używane do obsługi systemu i innych programów. Pokazuje pamięć masową komputera. Nie możesz usunąć tych plików z Medit Link.
Usuń	Usuń wybrane pliki z komputera.

Przechowywanie w chmurze

Zarządzaj przestrzenią pamięci masowej w chmurze.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name


Apply

Close

Typ	Wybierz program CAD, którego chcesz użyć do projektowania. Program dostosuje wyniki na podstawie Twojego wyboru, umożliwiając kontynuowanie projektowania bez dodatkowego dopasowania osi.
Eksportuj pliki do	Określ ścieżkę, gdzie chcesz przechowywać wyniki.
Format siatki	Określ format końcowego pliku siatki.
Format obrazu	Określenie formatu eksportowanych plików obrazów.
Kompresja & Połącz	Kompresja plików: Skompresuj wszystkie wyniki do jednego pliku. Połącz poszczególne siatki: Połącz wszystkie wyniki dla szczęki lub żuchwy w jeden plik. Kiedy używasz niektórych programów, które nie mogą importować i pracować z wieloma plikami, możesz połączyć je w jeden, aby pracować w tych programach.
Opcje, gdy ten sam folder lub plik już istnieje.	Wybierz domyślną akcję dla przypadków, gdy ten sam folder lub nazwa pliku istnieje w ścieżce docelowej. • Zawsze pytaj przy eksportowaniu. • Eksportuj nowy plik i nadpisz istniejące pliki. Aktualnie przechowywany plik zostanie utracony. • Utwórz folder i wyeksportuj pliki
Reguła dotycząca nazwy folderu	Określenie zasad tworzenia nazwy folderu podczas eksportu plików. Ustawione zasady będą stosowane do nazewnictwa folderów, a eksportowany plik będzie zapisywany w utworzonym folderze. Poniższe informacje mogą być użyte do ustawienia reguły. • Konto kliniki Data utworzenia przypadku, Data skanowania, Data zamówienia, Nazwa pacjenta, Nazwa przypadku, Nazwa partnera, ID pacjenta, ID zamówienia • Konto laboratorium Data utworzenia przypadku, Data skanowania, Data zamówienia, Nazwa pacjenta, Nazwa przypadku, Nazwa partnera, ID zamówienia
Reguła dotycząca nazwy pliku	Zdefiniuj reguły dla nazwy eksportowanego pliku. Poniższe informacje mogą być użyte do ustawienia reguły. • Konto kliniki Data utworzenia przypadku, Data skanowania, Data zamówienia, Nazwa pacjenta, Nazwa przypadku, Nazwa partnera, ID pacjenta, ID zamówienia • Konto laboratorium Data utworzenia przypadku, Data skanowania, Data zamówienia, Nazwa pacjenta, Nazwa przypadku, Nazwa partnera, ID zamówienia

Narzędzie do konwersji przypadków


Możesz przenosić przypadki między różnymi kontami, eksportując istniejące przypadki z konta lub importując przypadki wyeksportowane z innych kont.

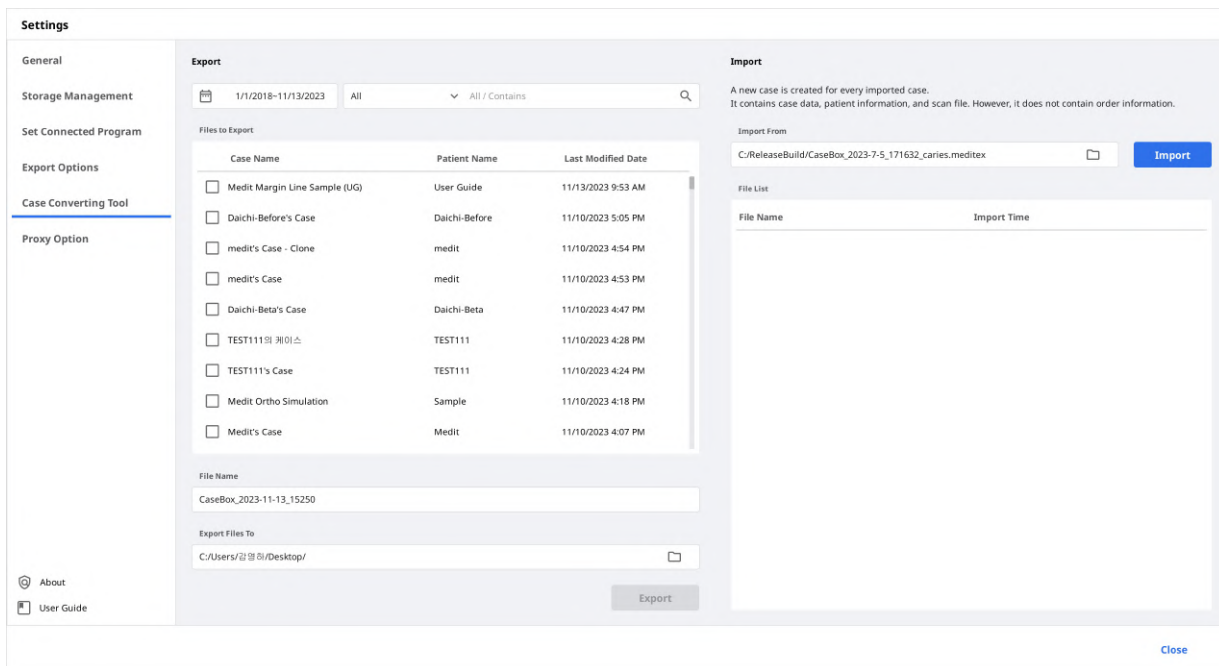


Eksportuj przypadek

Eksport przypadków aktualnie zalogowanego konta do lokalnego komputera.


1. Otwórz Medit Link i kliknij ikonę Ustawienia.

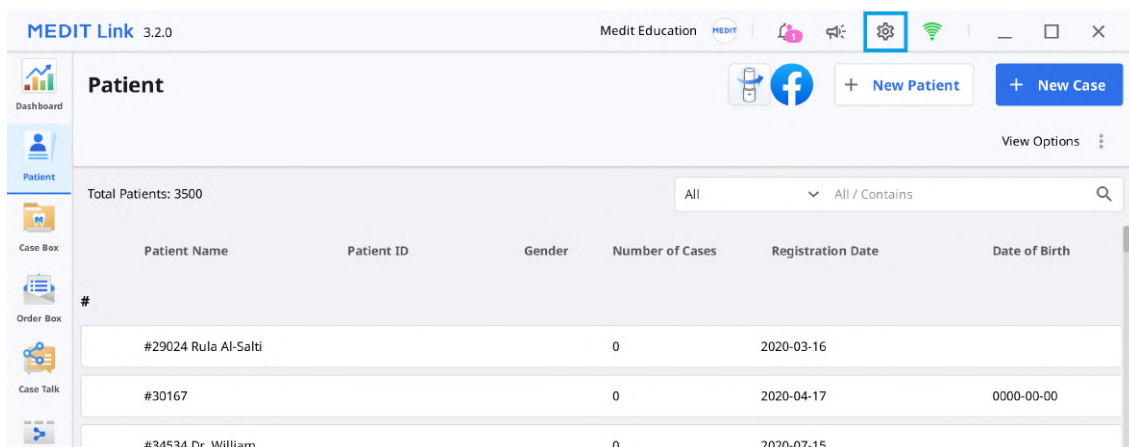


2. W menu po lewej stronie wybierz sekcję "Narzędzie do konwersji przypadków".

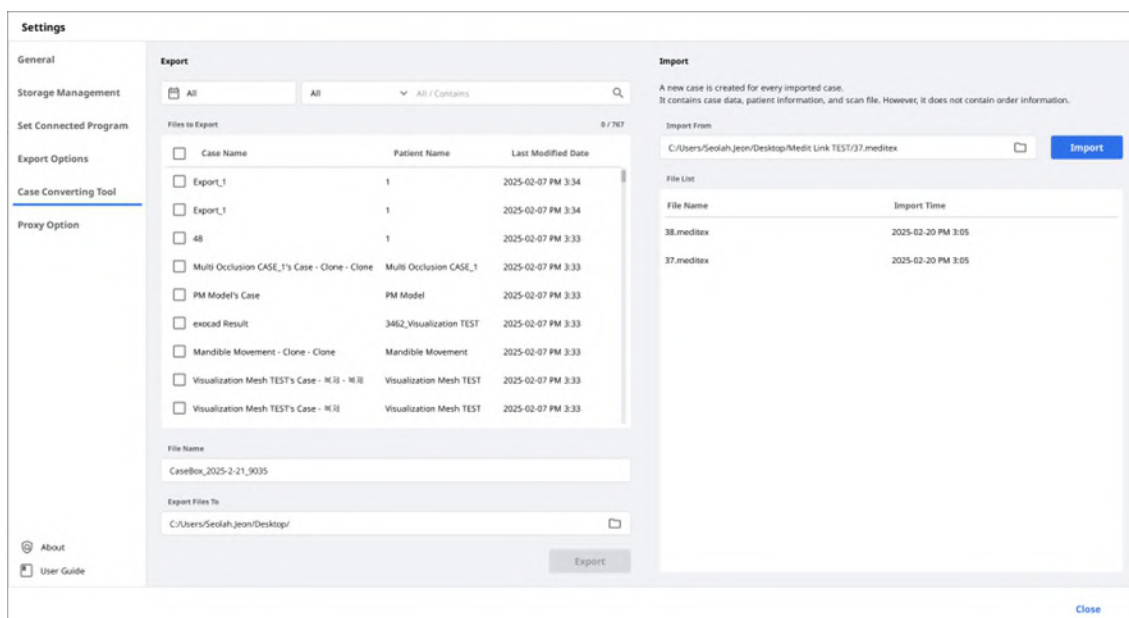

3. W sekcji Eksport ustaw okres lub wyszukaj przypadki do wyeksportowania, jeśli to konieczne.

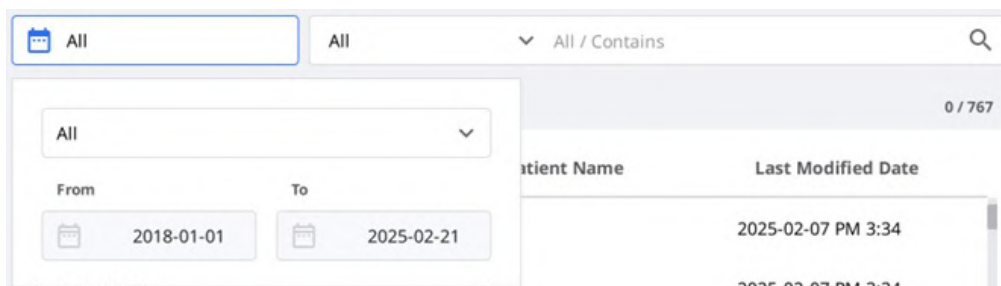

4. Wybierz przypadki, które chcesz wyeksportować z listy w sekcji "Plik do eksportu".

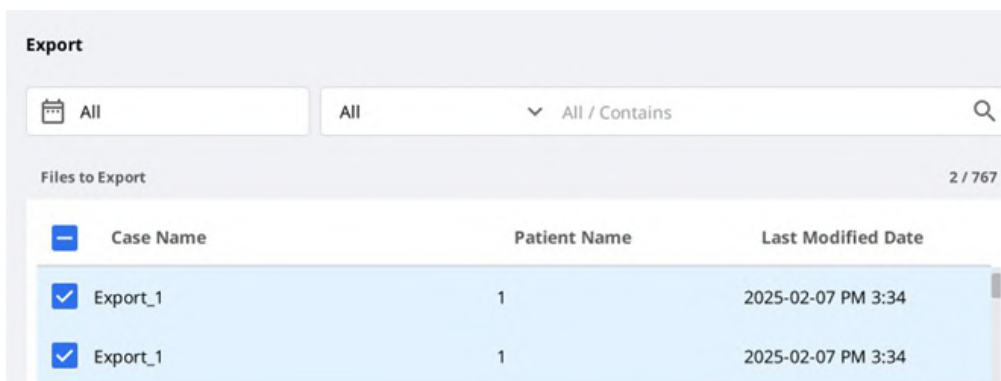

5. Ustaw nazwę pliku, edytując nazwę przypadku w polu Nazwa pliku.
6. Ustaw folder docelowy, aby wyeksportować wybrane przypadki.
7. Kliknij "Eksportuj".
8. Kliknij "Tak", aby otworzyć folder, do którego eksportowany jest plik.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. Eksportowane przypadki są zapisywane w formacie pliku .meditex.

Importuj przypadek

1. Otwórz Medit Link i kliknij ikonę Ustawienia.

MEDIT Link 3.2.0 Medit Education

Patient

Total Patients: 3500

All / Contains

#	Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
	#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
	#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
	#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

- W menu po lewej stronie wybierz sekcję "Narzędzie do konwersji przypadków".

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

All / Contains

Files to Export 0 / 767

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34
☐ Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34
☐ 48	1	2025-02-07 PM 3:33
☐ Multi Occlusion CASE_1's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion CASE_1	2025-02-07 PM 3:33
☐ PM Model's Case	PM Model	2025-02-07 PM 3:33
☐ exocad Result	3462_Visualization TEST	2025-02-07 PM 3:33
☐ Mandible Movement - Clone - Clone	Mandible Movement	2025-02-07 PM 3:33
☐ Visualization Mesh TEST's Case - WII - WII	Visualization Mesh TEST	2025-02-07 PM 3:33
☐ Visualization Mesh TEST's Case - WII	Visualization Mesh TEST	2025-02-07 PM 3:33

File Name

CaseBox_2025-2-21_9035

Export Files To

C:/Users/Seolah.Jeon/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/Users/Seolah.Jeon/Desktop/Medit Link TEST/37.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
38.meditex	2025-02-20 PM 3:05
37.meditex	2025-02-20 PM 3:05

Close

- W sekcji Importuj kliknij ikonę folderu, aby wyszukać na komputerze plik .meditex, który chcesz importować.

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

- Kliknij przycisk "Importuj" i zaznacz pliki do zaimportowania na poniższej liście.

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

5. Zaimportowany przypadek pojawi się również w Case Box (konto Kliniki) lub Work Box (konto Laboratorium).

Opcje proxy

W niektórych ograniczonych środowiskach sieciowych można zmienić ustawienia sieci.

Settings

General
Storage Management
Set Connected Program
Export Options
Case Converting Tool
Proxy Option

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

O programie

Pokaż szczegółowe informacje o Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name	Medit Link
Version	3.3.0
Build Number	123
Server	Operation Korea
UDI DI	(01)8800026700449
UDI PI	(10)3.3.0

Medit Corp.

품목명	1등급 치과 영상 전송장치소프트웨어
모델명	ML-STD001
품목별제조신고번호	제신 25-112호
사용방법 및 사용시 주의 사항	사용설명서 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
제조자의 상호:	(주)메디트
제조자의 주소:	서울특별시 영등포구 양평로 25길 8 9층, 10층
제조자의 연락처:	+82-2-2193-9600

본 제품은 「디지털의료기기소프트웨어」임

 2025.03

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☐ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Podręcznik użytkownika


Pobierz przewodnik użytkownika do Medit Link.

Otwarcie podręcznika użytkownika wymaga połączenia z Internetem.

Menu

Dashboard

Możesz przeglądać statystyki całej pracy wykonanej na Medit Link w zwizualizowanych wykresach i tabelach - zarówno w aplikacji Medit Link App jak i Web.

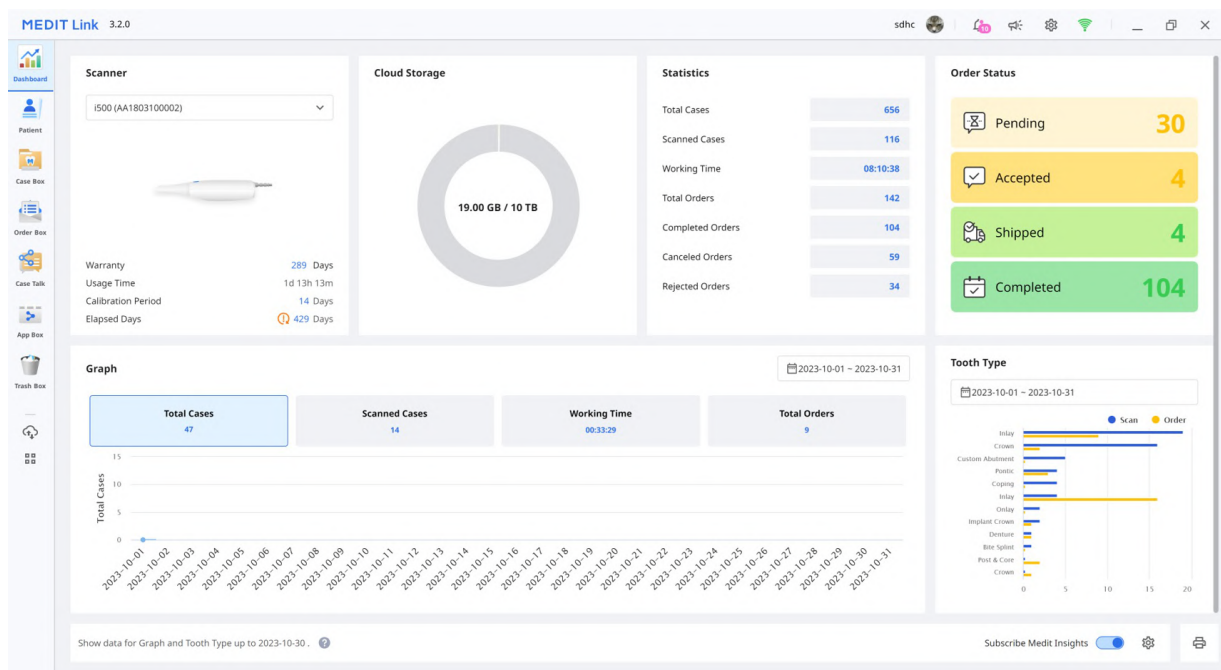

Uwaga

Prosimy odnieść się do [Medit Link Web > Dashboard](#), aby uzyskać więcej informacji na temat dashboard i Medit Insights.

Patient

Możesz dodawać, edytować, usuwać lub łączyć pacjentów w menu Patient.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scanned Date	Last Modified Date	Registration Date
agdsfsgdg				1			2020-09-24 PM 5:03
addTEST				1			2021-06-17 AM 11:54
aaaa				1			2023-04-22 PM 4:25
aaa				1			2023-04-22 PM 5:08
aa				1			2023-03-06 PM 6:32
a				1			2023-05-31 PM 2:07
Arch test				1			2020-08-17 PM 12:26
Arch Order Test				2			2020-09-01 PM 2:17
Abutment Scan				1	2022-04-04 PM 2:23		2022-04-04 PM 2:15
Abutment Cut test				1	2019-12-05 PM 6:03		2019-12-05 PM 5:59
AAA				1			2023-08-16 PM 4:06

Dodaj nowego pacjenta

1. Kliknij "Nowy pacjent".

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

YYYY MM DD

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo


Cancel Save

2. Wypełnij wymagane informacje w oknie dialogowym Nowy pacjent, a następnie kliknij "Zapisz".

Usuń pacjenta

Pacjenta można usunąć tylko wtedy, gdy nie ma dla niego żadnych przypadków.

1. Wybierz z listy pacjenta, którego chcesz usunąć.

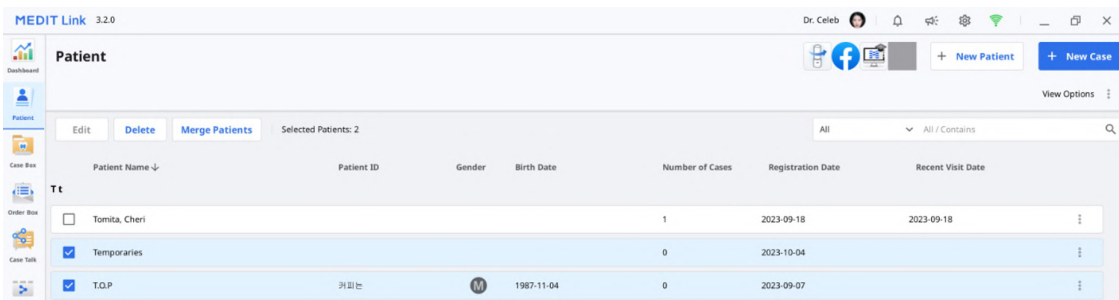


2. Kliknij "Usuń".

Łączenie pacjentów

Możesz połączyć wszystkie przypadki wielu pacjentów w jednego pacjenta.

1. Wybierz z listy pacjentów, których chcesz połączyć.

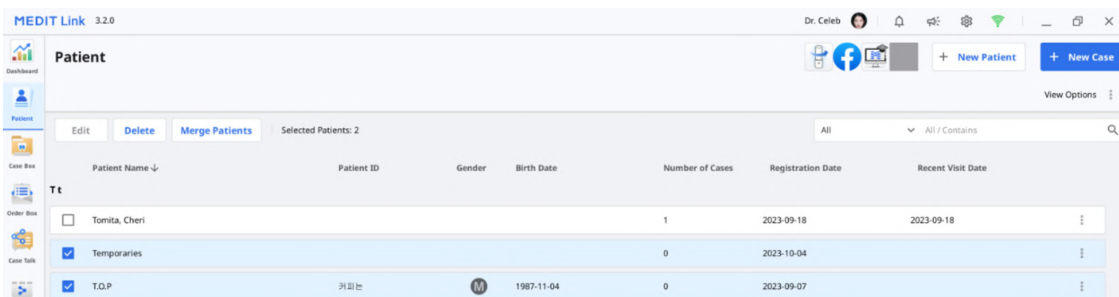

2. Kliknij "Połącz pacjentów".
3. Wybierz pacjenta docelowego, z którym chcesz połączyć wszystkie przypadki.
4. Wszystkie przypadki są łączone z pacjentem docelowym, a informacje o pacjencie docelowym są utrzymywane.

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Kliknij "Zastosuj", aby kontynuować scalanie.

Case Box/Work Box

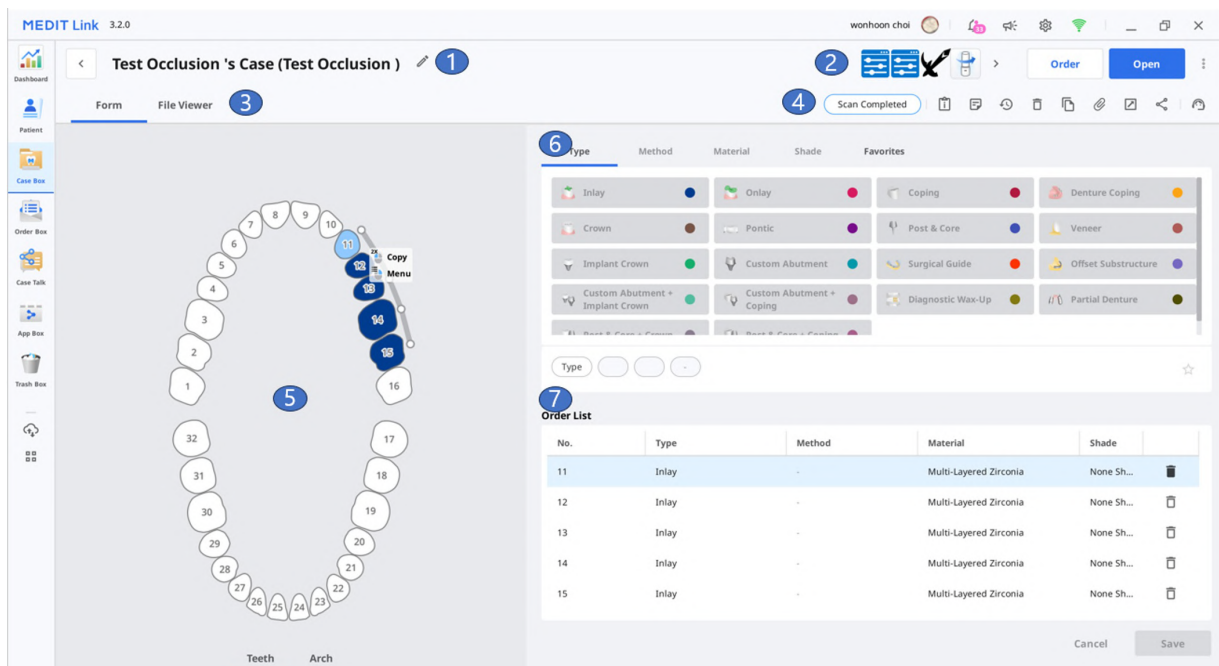

1	Pokaż nazwę przypadku i nazwisko pacjenta.
2	Udostępnienie kluczowych funkcji: Przycisk Skanuj lub Otwórz, przycisk Zamówienie, ikony aplikacji.
3	Pokaż dostępne zakładki: Formularz, Przeglądarka plików.
4	Pokaż funkcje zarządzania przypadkami i plikami.
5	Pokaż interfejs użytkownika formularza rejestracji dla wybranego programu do skanowania.
6	Podaj typ/metodę/materiał/odcień, który użytkownicy mogą wybrać dla wybranego numeru zęba.
7	Pokaż informacje o typie/metodzie/materiale/odcieniu zastosowanym dla wybranych zębów.

Zakładki w Case Box/Work Box

Formularz	Przeglądarka plików
Zakładka Formularz zapewnia interfejs użytkownika do wprowadzania podstawowych informacji dotyczących skanowania pracy, takich jak typ, metoda, materiał dla numerów zębów i opcje skanowania. Wprowadzone informacje są przekazywane do podłączonego programu skanującego i wykorzystywane jako informacje o zamówieniu podczas składania zamówienia u partnera.	Przeglądaj pliki wynikowe generowane przez programy skanujące i CAD. Przeglądarka plików wyświetla i zarządza pozyskanymi lub dołączonymi modelami 3D i obrazami 2D.

Funkcje w Case Box/Work Box

Następujące funkcje są dostępne w Case Box/Work Box.

	Status przypadku	Pokazuje status przypadku.
	Przejdź do Order Box/In Box	Zapewnia skrót do tego samego przypadku w innym polu (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Informacje o przypadku	Przejrzyj szczegóły przypadku i zapisz je jako PDF lub wydrukuj.
	Notatki &Tagi	Dodaj notatkę lub tagi podczas rejestracji lub zamawiania przypadku. Wykorzystaj je do przekazania partnerom wszelkich dodatkowych lub uzupełniających informacji o danym przypadku.
	Historia przypadku	Podaje szczegółowe informacje na temat historii przypadku. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	Usuń	Usuń przypadek. Nie możesz usunąć zamówionych przypadków lub przypadków, które zostały utworzone w trybie offline.
	Klonuj	Utwórz powtórzenie bieżącego przypadku w Case Box. Wszystkie dane zostaną skopiowane do sklonowanego przypadku. Ta funkcja pomaga powielić informacje o leczeniu tego samego pacjenta lub wykonać dodatkowe zamówienie z tymi samymi informacjami lub plikami.
	Dołącz	Dołącz pliki w różnych formatach.
	Eksportuj	Eksportuj pliki wyników skanowania lub CAD do lokalnego komputera. Możesz wybrać preferowany format pliku podczas eksportowania plików. Wyeksportowane pliki mogą być wykorzystywane w oprogramowaniu CAD i CAM do dalszej pracy.
	Udostępnij	Utwórz link do udostępniania. Użytkownicy posiadający link udostępniający mogą uzyskać dostęp do danych 3D w przeglądarce internetowej, takiej jak Chrome, Firefox lub Safari, bez konieczności instalowania dodatkowych programów. Możesz udostępnić link swobodnie każdemu lub tylko określonym osobom. Kod PIN lub data ważności linku mogą być ustawione w celu zabezpieczenia prywatnych informacji.
	Przełącz prośbę opomoc techniczną	Przejdź do strony Centrum Pomocy Medit, aby przesłać wniosek o pomoc techniczną.

Order Box/In Box

1	Pokaż nazwę przypadku i nazwisko pacjenta.
2	Udostępnienie funkcji do zarządzania zamówieniami (przyjmowanie/anulowanie; dostarczanie/odbieranie).
3	Pokaż dostępne zakładki: Zamówienie, Przeglądarka plików.
4	Pokaż funkcje zarządzania przypadkami i plikami: status przypadku, skróty do szczegółowych informacji, informacje o przypadku, notatka & tagi, itp.
5	Pokaż szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, w tym numer zamówienia, nazwę pacjenta, nazwę partnera, datę skanowania, datę zamówienia, datę dostawy i notatka & tagi.
6	Pokaż informacje o zamówionym produkcie i statusie dostawy.

Zakładki w Order Box/In Box

Zamówienie	Przeglądarka plików
Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, takie jak numer zamówienia, nazwisko pacjenta, nazwa konta, data skanowania, data zamówienia, data dostawy, notatka i tagi.	Przeglądaj pliki wygenerowane w wyniku operacji skanowania/CAD. Przeglądarka plików wyświetla i zarządza pozyskanymi lub dołączonymi modelami 3D i obrazami 2D.

Case Talk

Przypadki utworzone w Medit Link mogą być udostępniane konkretnym osobom, każdemu z linkiem udostępniającym lub zarejestrowanym członkom Medit Link.

Użytkownik może zobaczyć listę wszystkich udostępnionych przypadków poprzez Case Talk w Medit Link App i Medit Link Web.

Uwaga

Usługa Case Talk wymaga połączenia z internetem.

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolahjeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

Udostępnione przypadki można przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania osobnego programu, co pozwala na łatwą komunikację za pomocą danych 3D na różnych urządzeniach.

App Box

App Box zapewnia różne programy dodatkowe, które uzupełniają podstawowy przepływ pracy skanowania i zwiększają wydajność. Możesz pobrać i zainstalować udostępnione aplikacje, aby tworzyć urządzenia dentystyczne, analizować dane skanowania, pomagać podczas konsultacji lub usprawniać proces pracy.

Join the Medit Users Group on Facebook!
Connect with Experts, Learn Valuable Tips, and Elevate Your Skills
[Join Now](#)

Explore Medit Resources
News, tips, and expert insights on Digital Dentistry
[Visit Now](#)

Featured Apps

- Medit DCM Converter** (Update) - Convert 3Shape DCM files to Medit-compatible format
- Medit Smile Design** (Installed) - Simulation of teeth movement for orthodontic cases
- Medit Ortho Simulation** (Install) - Simulate the trajectory of teeth movement using Medit Ortho...
- Action Gate (ヨシダ - Yoshida)** (Install) - Comprehensive dental PMS
- DentWeb(덴트웹) Integration** (Install) - Comprehensive dental PMS
- EasyRx Integration** (Install) - Universal orthodontic LMS
- Open Dental Integration** (Install) - Quality software for dental offices
- iie systems connector** (Install) - PRIM specialized for orthodontics
- OneClick Integration App** (Install) - Osstem's easy-to-use PMS
- i-Pro Integration** (Install) - Comprehensive dental PMS
- LOGOSw Integration** (Install) - Add a link between LOGOSw and Medit Link
- DentalCAD Integration** (Install) - Allow to integrate Medit Link with DentalCAD
- Action Gate (ヨシダ - Yoshida)** (Install) - Comprehensive dental PMS
- Andcom Integration** (Install) - Convenient dental PMS

Wszystko


Zakładka "Wszystko" pokazuje listę wszystkich udostępnionych aplikacji, w tym oryginalnych aplikacji opracowanych przez Medit (Medit Apps) i aplikacji partnerskich, które są aplikacjami integracyjnymi z partnerami Medit z różnych sektorów stomatologii cyfrowej, takich jak druk 3D, oprogramowanie CAD / CAM itp.

Medit Apps

Zakładka "Medit Apps" pokazuje tylko listę oryginalnych aplikacji opracowanych przez Medit.

Pobrane

Zakładka "Pobrane" wyświetla listę aktualnie zainstalowanych aplikacji na komputerze oraz aplikacji, które zostały pobrane przez konto użytkownika w przeszłości.

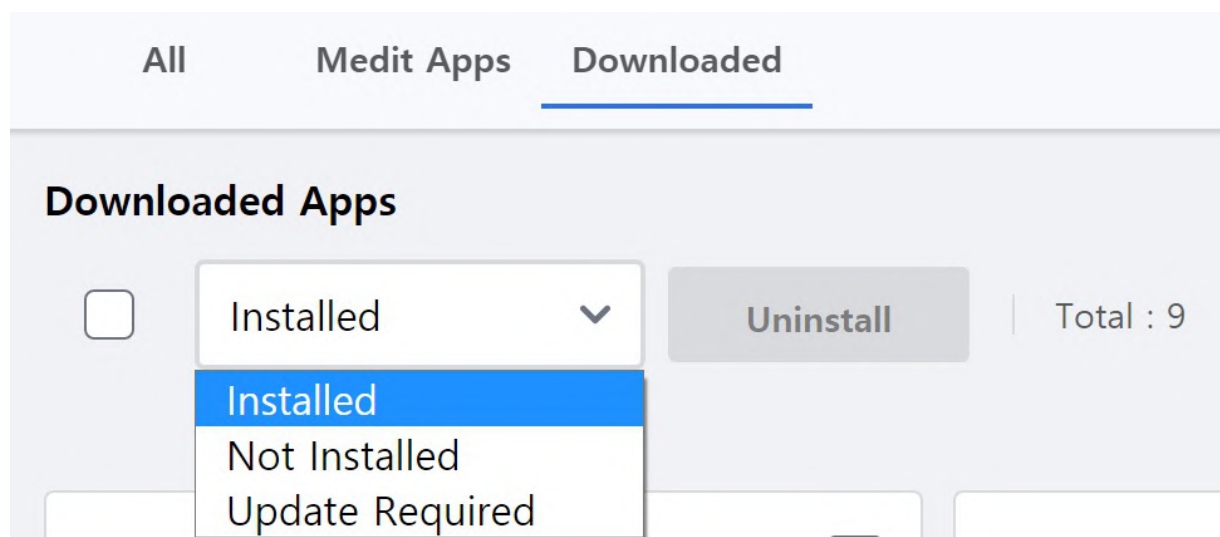

- **Zainstalowane:** Opcja wyświetla tylko aplikacje zainstalowane na komputerze, na którym użytkownik jest aktualnie zalogowany.
- **Nie zainstalowane:** Ta opcja pozwala zobaczyć aplikacje zainstalowane na innych komputerach, dzięki czemu można je szybko zainstalować.
- **Wymagana aktualizacja:** Ta opcja pokazuje tylko aplikacje zainstalowane na bieżącym komputerze, które wymagają aktualizacji.

Trash Box

Trash Box tymczasowo przechowuje usunięte przypadki. Każdy przypadek z Trash Box może zostać przywrócony lub trwale usunięty.

Uwaga

Dane usunięte z Trash Box zostaną trwale usunięte z komputera oraz serwera i nie będzie można ich odzyskać.

MEDIT Link 3.2.0		wonhoon choi				
Trash Box						
☐ Restore ☐ Selected Cases: 0		All All / Contains				
Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐ Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐ Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Administrator synchronizacji przypadków

Administrator synchronizacji przypadków pomaga w wydajnym przesyłaniu i pobieraniu przypadków. Możesz przesłać wiele przypadków do chmury lub pobrać je na lokalny komputer. Aby zidentyfikować przypadki wymagające synchronizacji, wystarczy je wyszukać lub zastosować filtr według daty.

Case Synchronization Manager

Upload

Download

All

Case Name

Case Name / Contains

Total Cases: 210

No Date

Data Type

All

Case Name	Patient Name	Scanned Date↓	Size	Status
BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

Close

Prześlij

 Upload	Prześlij wybrane przypadki.
 Cancel	Anuluj przesyłanie wybranych przypadków.
 Retry	Ponów przesyłanie przypadków, jeśli przesyłanie zakończy się niepowodzeniem.

Pobierz


 Download	Pobierz wybrane przypadki.
 Cancel	Anuluj pobieranie wybranych przypadków.
 Retry	Ponów pobieranie, jeśli pobieranie zakończy się niepowodzeniem.

Powiązane strony internetowe

Możesz przejść bezpośrednio do menu dostępnych tylko w Medit Link Web, takich jak My Info, Partners i Membership. Prosimy odnieść się do Medit Link > Medit Link Web > [Partners](#), [Membership](#) i [My Info](#) w celu uzyskania szczegółowych opisów menu Medit Link Web.

Możesz uzyskać dostęp do sklepu internetowego Medit, Medit Shop, w którym możesz zakupić przedłużoną gwarancję na skanery i inne produkty Medit, takie jak plecaki na skanery.

Możesz również uzyskać różne informacje na temat korzystania z Medit Link. Dostęp do zasobów edukacyjnych i informacyjnych Medit, takich jak Centrum pomocy Medit, kanał YouTube Medit Academy i internetowa platforma edukacyjna Medit Academy.

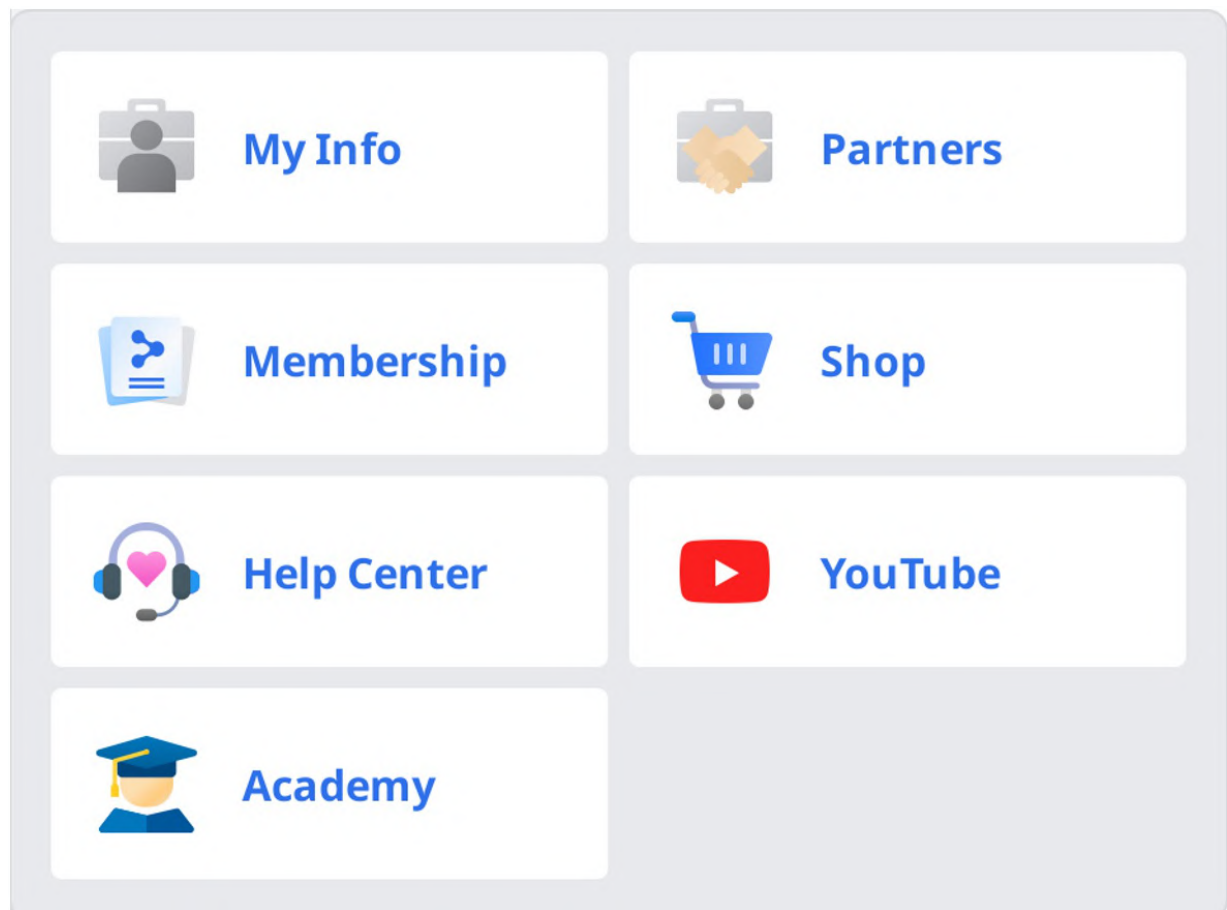

Przeglądarka plików

Przeglądarka plików grupuje i pokazuje różne dane, w tym dane pozyskane z programów połączonych z Medit Link oraz dane dołączone przez użytkowników.



Zapewnia podstawowe funkcje zarządzania, takie jak pokazywanie/ukrywanie danych, dostosowywanie nieprzejrzystości i usuwanie danych.

Obsługuje podglądy plików w następujących formatach:

- Dane 3D: STL, OBJ, PLY
- Obrazy 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Pliki wideo: MKV, MP4, AVI, WMV

Drzewo danych

Możesz grupować i wyświetlać wszystkie dane dla przypadku w drzewie danych. Możesz również pokazać/ukryć dane, dostosować przezroczystość i usunąć dane z drzewa danych.

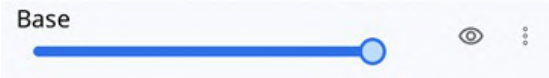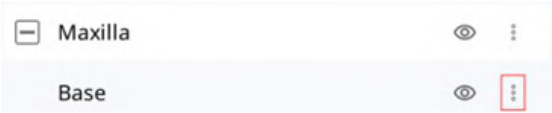
	Pokaż / Ukryj	Możesz pokazać lub ukryć dane.
	Nieprzejr- zystość	Suwak pojawia się po kliknięciu jednych z danych na drzewie danych. Możesz dostosować nieprzejrzystość wyświetlanych danych, przesuwaną suwak. 
	Więcej	Kliknięcie ikony Więcej pokazuje dodatkowe dostępne funkcje.  • Pokaż tylko to: Ukryj wszystkie inne dane, a wyświetl tylko te odpowiednie. • Ukryj: Ukryj dane. • Powtórzenie: Skopiuj dane i dodaj je do grupy załączników. • Eksportuj: Eksportuj wybrane pliki. • Zmień nazwę: Zmień nazwę danych. • Usuń: Usuń dane.



Uwaga

Możesz zmienić nazwę danych w trybie online.

Narzędzia kontroli modelu

Kontrola modelu 3D

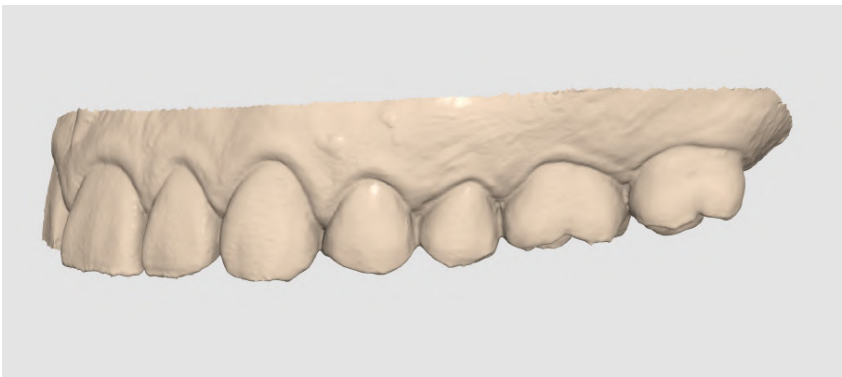+	Przesuń	Przesuwa model.
↺	Obróć	Obraca model.
🔍	Przybliż/Oddal	Powiększanie i zmniejszanie modelu.
📐	Dopasuj do ekranu	Ustaw model w centralnym punkcie ekranu.
🌈	Tryb wyświetlania danych	Błyszczący Zobacz dane w kolorze z błyszczącym wykończeniem (renderowanie PBR). 
🌈		Matowy Zobacz dane w kolorze z matowym wykończeniem (rendering Phong). 
●		Monochromatyczne Zobacz dane w jednym kolorze. 

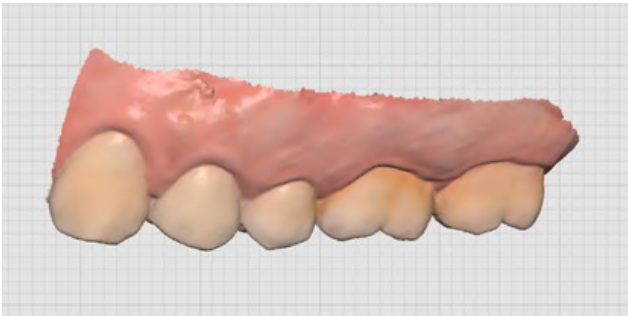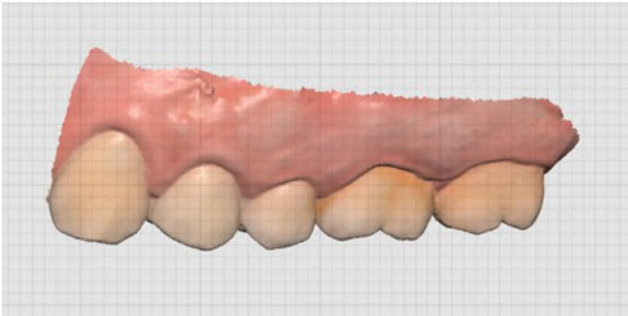	Ustawienia siatki (mm)	Siatka włączona	Pokazuje siatkę w tle. 
		Siatka wyłączona	Ukryj siatkę w tle.
		Nakładka włączona	Nakładanie siatki na model. 

Kontrola obrazu 2D


	Następny/Poprzedni obraz	Poruszanie się pomiędzy obrazami.
	Edytuj	Edytuj obraz.
	Kompresuj/Wklej okno	Możesz odłączyć okno obrazu i ustawić je w żądanej pozycji. Można zmienić rozmiar okna. Po przywróceniu okna do pierwotnej lokalizacji wraca ono do domyślnego rozmiaru.

Narzędzia funkcyjne

Przechwytywanie obrazu i Notatka


Przechwyć bieżący ekran jako obraz 2D, narysuj na nim lub dodaj notatki.


Możesz zapisać go jako plik ze swoimi notatkami i wysłać jako referencje.

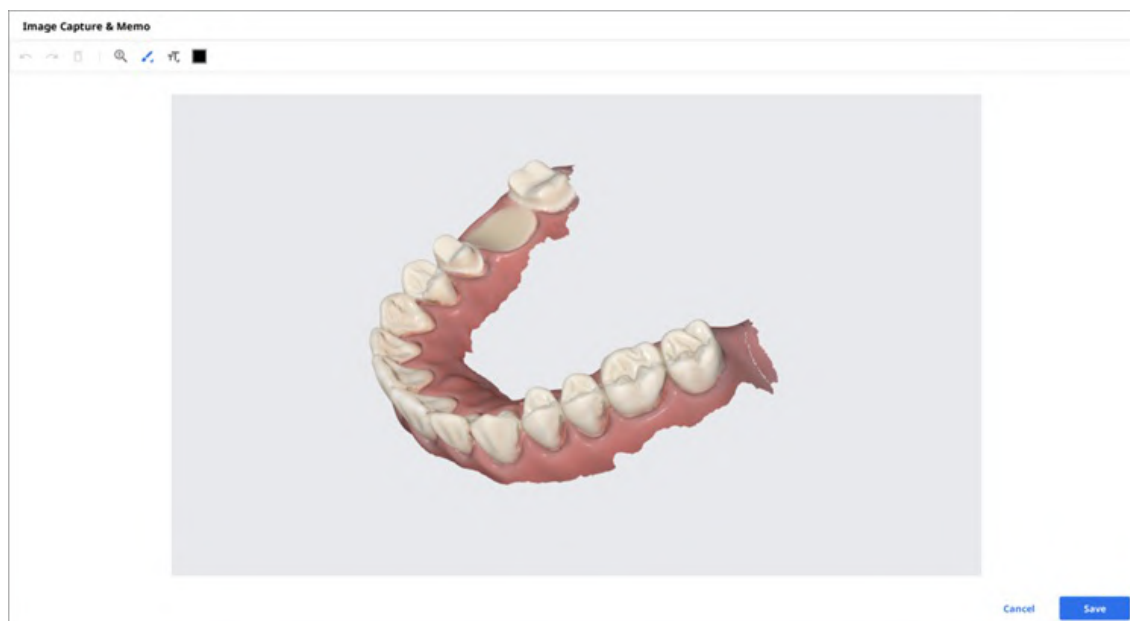

Przechwytywanie obrazów ortodontycznych

Przechwytywanie obrazów w aktualnym kierunku widzenia oraz góra/dół/lewo/prawo od aktualnego kierunku widzenia.

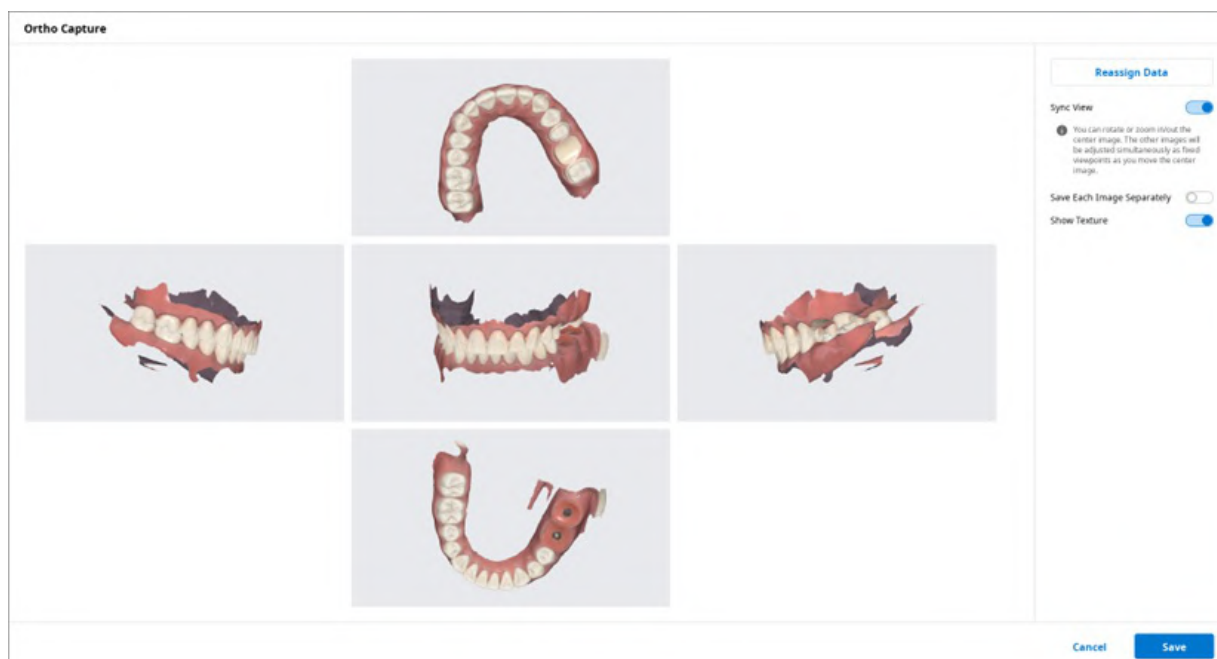

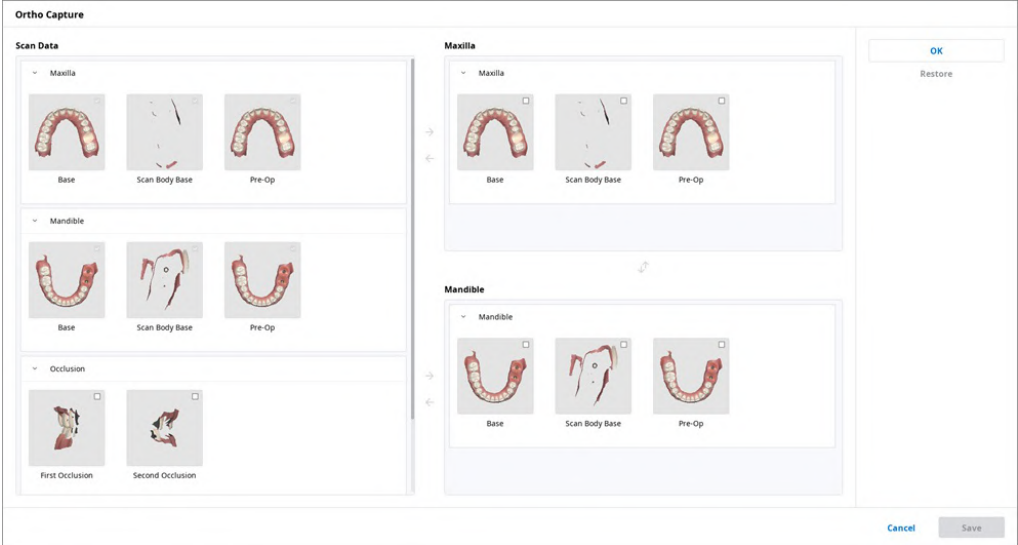
Widok synchronizacji	Gdy jest włączona, możesz obracać lub powiększać/pomniejszać środkowy obraz. Pozostałe obrazy będą regulowane jednocześnie jako stałe punkty widzenia w miarę przesuwania obrazu centralnego. Po wyłączeniu możesz przesuwać, obracać lub powiększać/pomniejszać wszystkie obrazy indywidualnie.
Zapisz każdy obraz osobno	Zapisz każdy obraz w wysokiej rozdzielczości.
Pokaż teksturę	Włączenie/wyłączenie tekstury dla modelu.
Ponowne przypisanie danych	Zmień dane dla szczęki/żuchwy za pomocą funkcji Ponowne przypisanie danych. Możesz użyć zmienionych danych do utworzenia i wykorzystania obrazów wynikowych w Przechwytywaniu obrazów ortodontycznych.  • Dane skanowania: Pokazane są wszystkie dane skanowania dla danego przypadku. • Szczeka: wyświetlane są dane wybrane dla szczęki. • Żuchwa: Wyświetlane są dane wybrane dla żuchwy.

Wypełnij luki

Wypełnij luki w danych siatki 3D.

Wybór		Inteligentny wybór zębów	Automatycznie wybiera wszystkie zęby łuku, pomijając części dziąsła. Uwaga Ta funkcja jest dostępna tylko dla danych skanowania pozyskanych za pomocą Medit Scan for Clinics z włączoną opcją "Użyj GPU".
		Inteligentny wybór pojedynczego zęba	Automatycznie zaznacz obszar pojedynczego zęba jednym kliknięciem. Możesz kliknąć lub przeciągnąć ząb.
		Wybór krzywej	Wybiera wszystkie elementy w obrębie krzywej wyrysowanej na ekranie.
		Wybór pędzla	Zaznacz wszystkie elementy na ścieżce narysowanej odręcznie na ekranie. Zostanie wybrana tylko przednia strona. Pędzel jest dostępny w trzech różnych rozmiarach.
Regulacja wybranego obszaru		Skurcz wybrany obszar	Redukuje wybrany obszar za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk.
		Rozszerz wybrany obszar	Rozszerza wybrany obszar za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk.
		Odwróć wybrany obszar	Odwraca wybór.
Usunięcie wyboru		Wybór/Odrzucenie wyboru	Gdy jest to włączone, odznacz obszar za pomocą różnych narzędzi.
		Wyczyść wszystkie wybory	Oczyszcza cały wybrany obszar.
		Usuń wybrany obszar	Usuń dane z wybranego obszaru.

1. Zaznacz obszar, który chcesz przyciąć, używając narzędzi do zaznaczania obszaru.

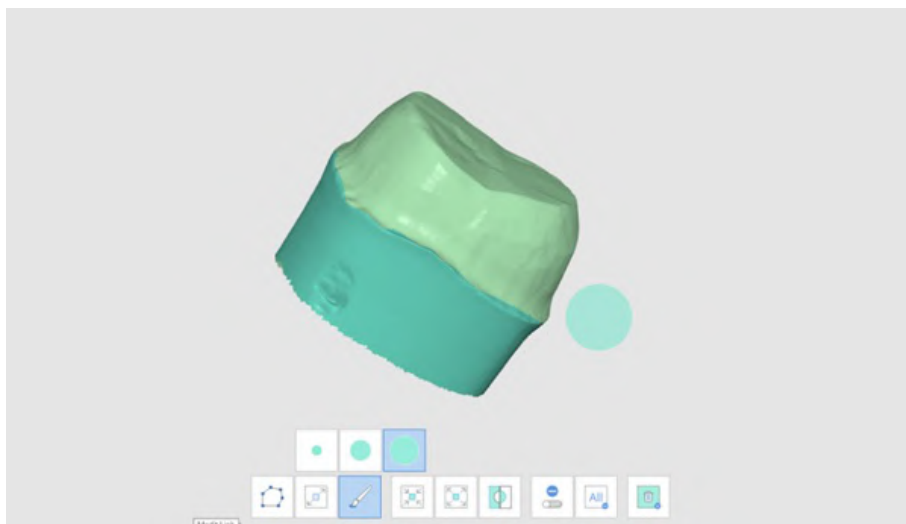


Uwaga


Narzędzie do przycinania polilinii zaznacza wszystkie elementy w obrębie kształtu polilinii narysowanego na ekranie, podczas gdy narzędzie do przycinania pędzlem zaznacza tylko dane powierzchni czołowej.

2. Możesz odwrócić, zmniejszyć lub rozszerzyć zaznaczenie za pomocą następujących trzech narzędzi.


- Odwróć wybrany obszar

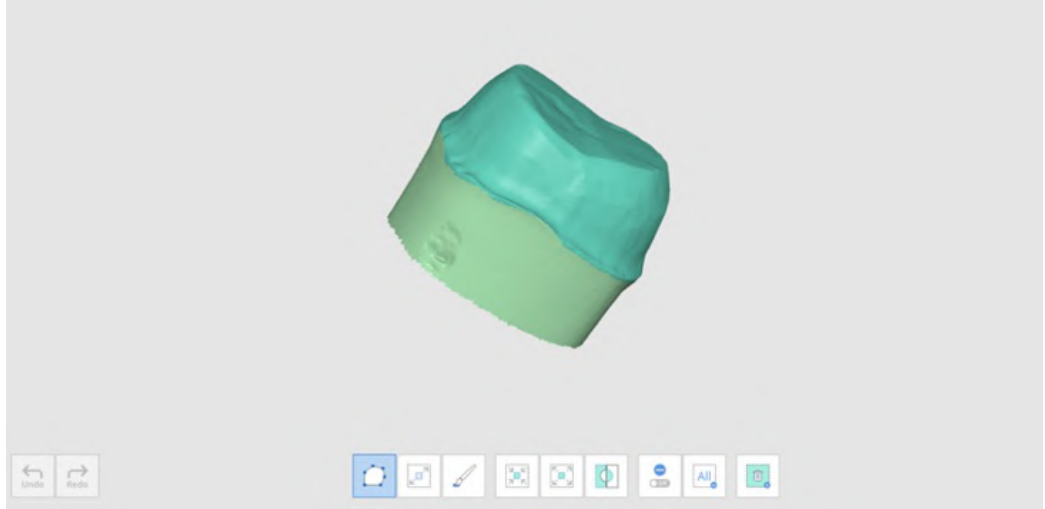

- Skurcz wybrany obszar

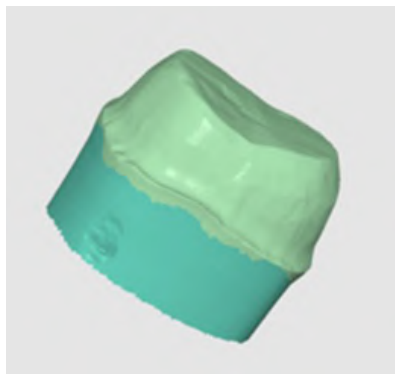

- Rozszerz wybrany obszar

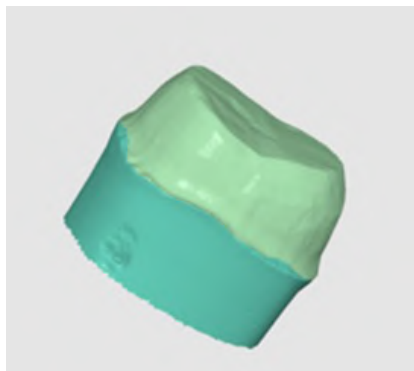



3. Możesz odznaczyć wybrane obszary za pomocą narzędzia Usuń wybrany obszar.

Optymalizuj dopasowanie okluzji

Optymalizacja dopasowania okluzji. Możesz wybrać dane docelowe i dostosować dopasowanie okluzji.




Poziom wyrównania

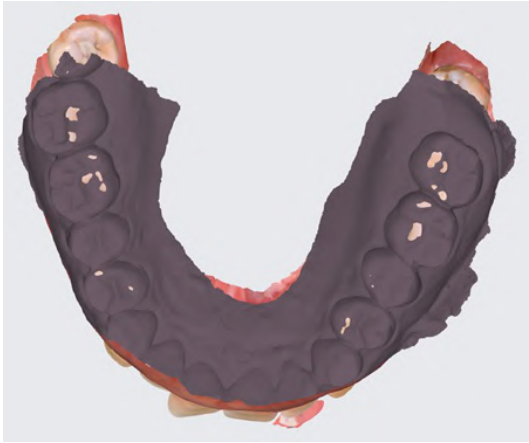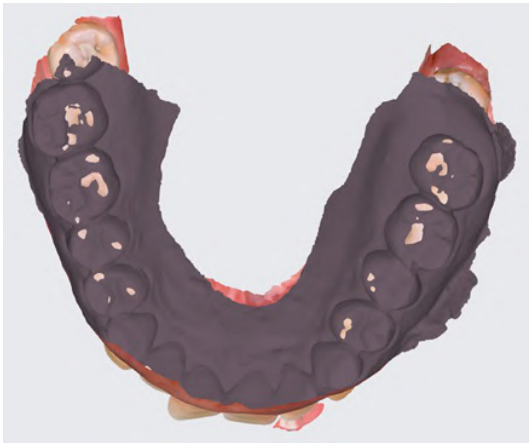Niski	Compensation Level    	
Średni	Compensation Level    	
Wysoki	Compensation Level    	
Wyłączone	Compensation Level    	

Ruch żuchwy

Możesz odtworzyć ruchy żuchwy zarejestrowane w Medit Scan for Clinics, aby zobaczyć dynamiczne kontakty okluzyjne pomiędzy górnym i dolnym uzębieniem.

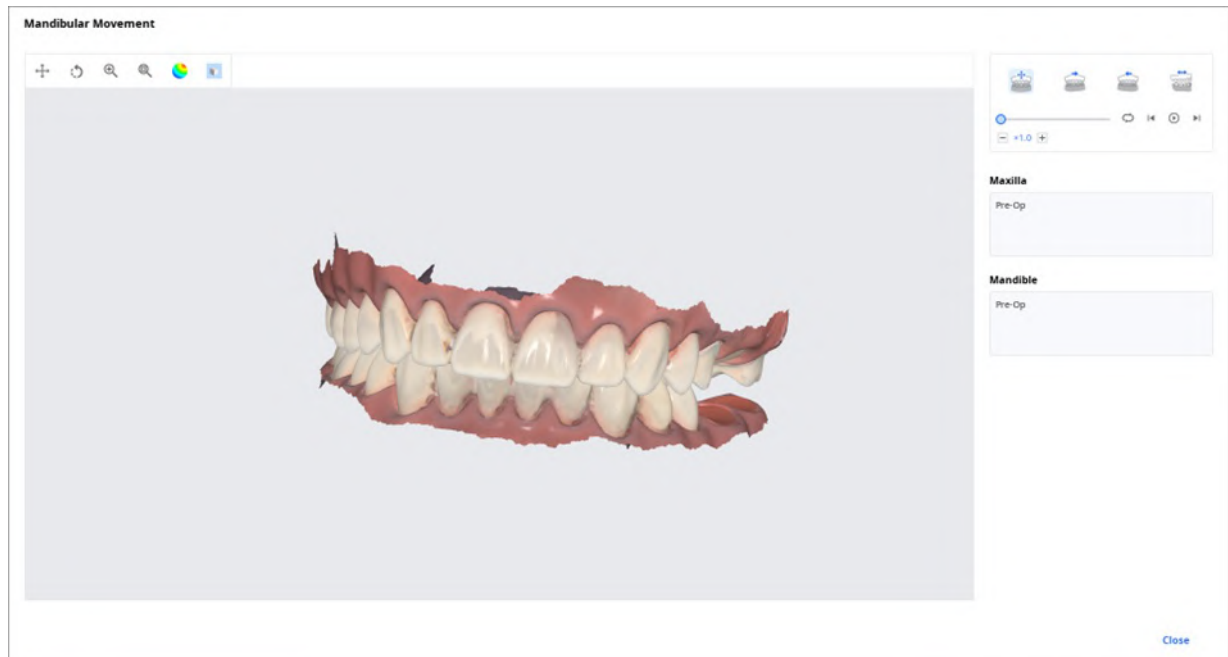

	Ruch swobodny	Odtwórz nagranie swobodnego ruchu żuchwy.
	Lewy ruch boczny	Odtwórz nagranie, na którym żuchwa przesuwa się w lewo.
	Prawy ruch boczny	Odtwórz nagranie, na którym żuchwa przesuwa się w prawo.
	Ruch wysunięty	Odtwórz nagranie, na którym żuchwa przesuwa się do przodu.

Zarządzanie danymi wielu okluzji w przeglądarce plików

Możesz uzyskać wiele wyników danych okluzji z aplikacji Medit Scan.

Medit Link udostępnia funkcję zarządzania wynikami poprzez "Przeglądarkę plików".

Jak zarządzać wieloma wynikami


Gdy użytkownik otrzymuje wiele wyników okluzji z Medit Scan for Clinics, Medit Link zapewnia możliwość wyboru wyniku.

Lista wyników jest ułożona według nazw i możesz wybrać jedną pozycję.

Wybrany model zostanie pokazany w "Drzewie danych" i "Obszarze wyświetlania modelu".



Możesz zwinąć listę i zmienić pozycję za pomocą ikon strzałek.

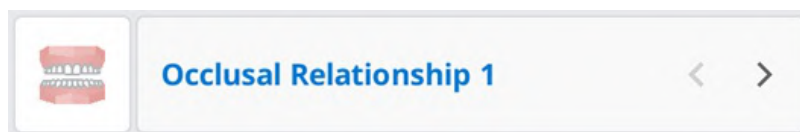

Przeglądaj opcje

Możesz zmienić Przeglądaj opcje, aby dostosować układ listy przypadków w polu Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

	Status Filters	2 in use >
	Table Items	8 in use >
	View Type	List View >
	Grouping	None >
	Sorting	Last Modified Date >

Filtry statusu

Pokaż lub ukryj każdy filtr reprezentujący status przypadku. Ukryte filtry statusu nie są wyświetlane na ekranie w Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Możesz łatwo znaleźć potrzebny przypadek za pomocą filtrów statusu.

- Możesz kliknąć status, który chcesz zobaczyć, aby wyświetlić tylko przypadki z danym statusem.
- Możesz wybrać wiele statusów jednocześnie.

Dla każdego pola dostępne są następujące opcje filtrowania:

Pole	Filtry statusu
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Pozycje tabeli

Wybierz elementy, które mają być wyświetlane na liście przypadków w polu Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Możesz zmienić kolejność elementów tabeli lub dostosować szerokość kolumn tabeli w widoku listy, aby jak najlepiej zoptymalizować środowisko użytkownika.

Dla każdego pola dostępne są następujące pozycje tabeli:

Pole	Pozycje tabeli
Patient	Imię i nazwisko pacjenta / ID pacjenta / płeć / liczba przypadków / data rejestracji / data urodzenia / data ostatniego skanowania
Case Box	Status / Nazwa przypadku / Data urodzenia / Formularz informacji / Data ostatniej modyfikacji / Data skanowania / Data zamówienia / Nazwa laboratorium
Order Box	Status / Nazwa przypadku / Nazwisko pacjenta / Data skanowania / Data zamówienia / Nazwa laboratorium / Wnioskowana data dostawy / Data ostatniej modyfikacji
In Box	Status / Nazwa przypadku / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy / Data ostatniej modyfikacji / Nazwa kliniki
Work Box	Status / Nazwa przypadku / Nazwa pacjenta / Formularz informacji / Data ostatniej modyfikacji / Wnioskowana data dostawy / Data skanowania / Nazwa kliniki / Data zamówienia

Typ przeglądania

Zmień typ przeglądania między Widokiem galerii a Widokiem listy w Case Box.

Dla każdego pola dostępne są następujące opcje typu przeglądania:

Pole	Opcje typu przeglądania
Patient	Widok listy
Case Box	Widok listy / Widok galerii
Order Box	Widok listy
In Box	Widok listy
Work Box	Widok listy

Grupowanie

Wybierz opcję grupowania, aby sklasyfikować i zmienić kolejność przypadków na liście według wybranej opcji.

Dla każdego pola dostępne są następujące opcje grupowania:

Pole	Opcje grupowania
Case Box	Brak / Imię i nazwisko pacjenta / Data skanowania / Data zamówienia
Order Box	Brak / Data skanowania / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy
In Box	Brak / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy
Work Box	Brak / Wnioskowana data dostawy



Opcje grupowania są niedostępne w polach Patient, Case Talk i Trash Box.

Sortowanie

Wybierz opcję sortowania, aby zmienić kolejność przypadków na liście zgodnie z wybraną opcją.

Dla każdego pola dostępne są następujące opcje sortowania:

Pole	Grupowanie	Opcje sortowania
Patient	-	Imię i nazwisko pacjenta / ID pacjenta / data urodzenia / data rejestracji / liczba przypadków / data ostatniego skanowania
Case Box	Brak	Imię i nazwisko pacjenta / data ostatniej modyfikacji / data skanowania / data zamówienia / nazwa laboratorium
	Nazwisko pacjenta	Data ostatniej modyfikacji / Data skanowania / Data zamówienia / Nazwa laboratorium
	Data skanowania	Nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Data zamówienia / Nazwa laboratorium
	Data zamówienia	Imię i nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Data skanowania / Nazwa laboratorium
Order Box	Brak	Imię i nazwisko pacjenta / Data skanowania / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy / Nazwa laboratorium
	Data skanowania	Nazwisko pacjenta / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy / Nazwa laboratorium
	Data zamówienia	Imię i nazwisko pacjenta / Data skanowania / Wnioskowana data dostawy / Nazwa laboratorium
	Wnioskowana data dostawy	Imię i nazwisko pacjenta / Data skanowania / Data zamówienia / Nazwa laboratorium
In Box	Brak	Nazwisko pacjenta / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy / Nazwa kliniki
	Data zamówienia	Imię i nazwisko pacjenta / Data skanowania / Wnioskowana data dostawy / Nazwa kliniki
	Wnioskowana data dostawy	Nazwisko pacjenta / Data zamówienia / Nazwa kliniki
Work Box	Brak	Nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Wnioskowana data dostawy / Nazwa kliniki
	Wnioskowana data dostawy	Nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Nazwa kliniki


Uwaga

Opcje sortowania są niedostępne w Case Talk i Trash Box.

Filtrowanie i wyszukiwanie


Filtruj według pacjenta

Filtrowanie i wyświetlanie przypadków według nazwiska pacjenta. Możesz utworzyć listę, filtrując tylko tych pacjentów, nad którymi chcesz pracować.

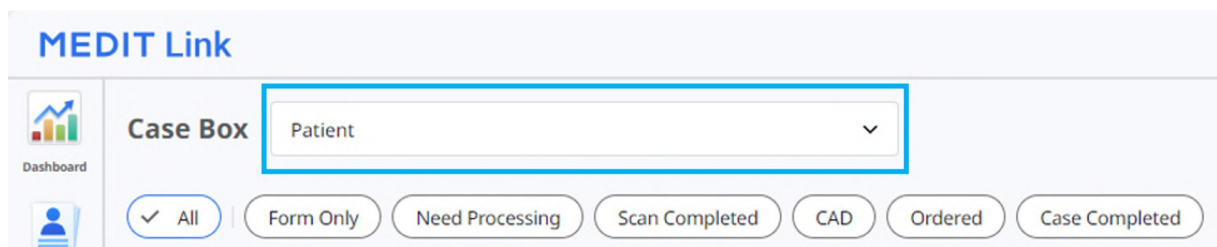

The screenshot shows the 'MEDIT Link' interface. On the left is a sidebar with a 'Dashboard' icon and a user icon. The main area has a 'Case Box' section with a search input field containing 'Patient' and a dropdown arrow. Below this are several filter buttons: 'All' (checked), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Wprowadź nazwisko pacjenta.

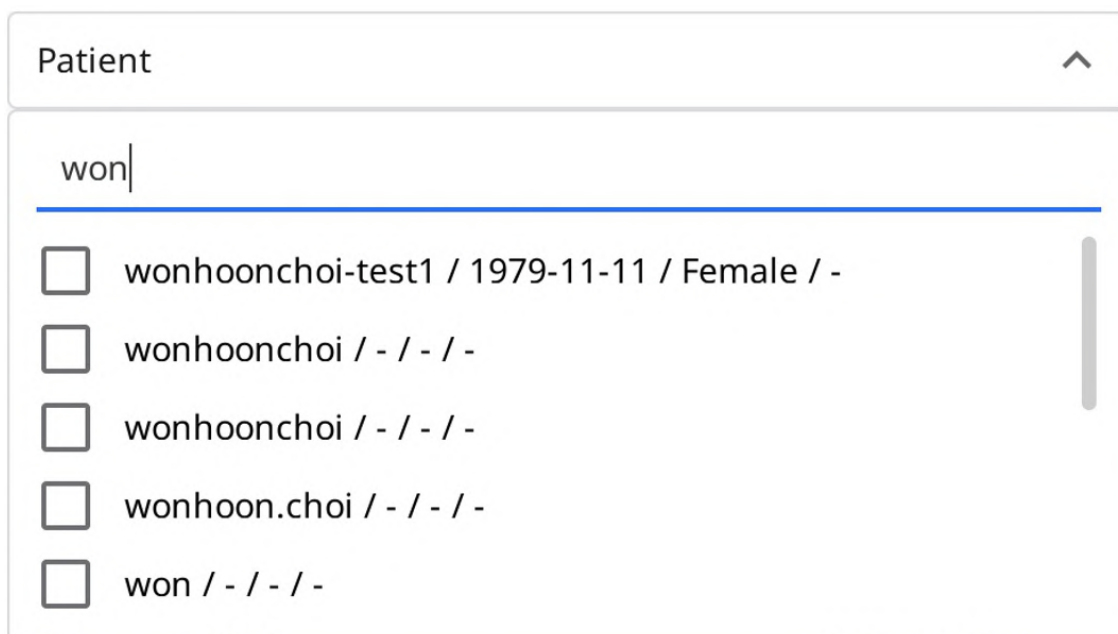

The screenshot shows the search results dropdown. The input field contains 'Patient' and an upward arrow. Below the input field, the text 'won' is entered. A list of search results is displayed, each with a checkbox and a patient identifier followed by slashes and dashes: 'wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -', 'wonhoonchoi / - / - / -', 'wonhoonchoi / - / - / -', 'wonhoon.choi / - / - / -', and 'won / - / - / -'.

2. Wybierz pacjentów spośród poniższych wyników wyszukiwania.

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2 ^

won|

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -

☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ won / - / - / -

☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234

☐ won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

☒ wonhoonchoi / - / - / -

☒ wonhoon.choi / - / - / -

☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. Na liście zostaną wyświetlone tylko przypadki wybranych pacjentów.

MEDIT Link 3.2.0

Wonhoon Choi Clinic

Case Box

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2

All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Case Completed

2018-01-01-2023-10-24

All / Contains

Total Cases: 20

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalCase	-	2023-10-05 오후 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오후 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오후 8:14	2023-02-09 오후 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오후 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오후 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오후 8:13	2023-02-09 오후 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오후 11:27	2023-02-09 오후 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오후 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오후 9:26	2023-02-09 오후 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오후 8:50	2023-02-09 오후 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Filtr według daty

Filtruj i wyświetlaj przypadki ostatnio zmodyfikowane w określonym czasie.

1. Kliknij filtr czasu trwania.

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Wybierz czas trwania z listy.

- Wszystko: Pokazuje wszystkie przypadki.
- Przedział niestandardowy: Określ daty początkowe i końcowe, aby wyświetlić przypadki zmodyfikowane w tym okresie.
- Dzisiaj: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane dzisiaj.
- Wczoraj: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane wczoraj.
- Minione 7 dni: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 7 dni z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- Minione 30 dni: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- Ten miesiąc: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w tym miesiącu.
- Poprzedni miesiąc: Pokaż przypadki zmodyfikowane w ciągu poprzedniego miesiąca.

Lista przypadków będzie aktualizowana w czasie rzeczywistym o przypadki utworzone lub ostatnio zmodyfikowane w wybranym okresie.

Zaawansowane możliwości wyszukiwania

Wykorzystaj możliwości wyszukiwania, aby szybko znaleźć potrzebne informacje.

All

▼

Search / Contains

🔍

Następujące kryteria wyszukiwania są dostępne dla każdego pola:

Patient	Wszystkie, Imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta
Case Box	Wszystkie, Nazwa przypadku, Nazwa pacjenta, ID pacjenta, Formularz informacji, Nazwa laboratorium
Order Box	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, ID pacjenta, nazwa laboratorium, ID zamówienia
In Box	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, nazwa kliniki, ID zamówienia
Work Box	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, formularz informacji, nazwa kliniki, ID zamówienia
Case Talk	Nazwa przypadku (Zawiera), Nazwa pacjenta (Równa się)
Trash Box (Klinika)	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, nazwa laboratorium, usunięte przez
Trash Box (Laboratorium)	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, nazwa kliniki, usunięte przez

Możesz wybrać Kryteria wyszukiwania i wybrać między logiką Zawiera i Równne.

All

▼

All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains

☐ Equals

Utwórz/Edytuj/Klonuj/Usuń przypadek

Tworzenie przypadków

Tworzenie przypadku w Case Box (Klinika)

1. Kliknij przycisk "Nowy przypadek" w prawym górnym rogu.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Wprowadź podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa przypadku.
 - Jeśli wprowadzisz nazwisko, którego nie ma na liście pacjentów, zostanie dodany nowy pacjent.
 - Jeśli wprowadzisz nazwisko, które znajduje się na liście pacjentów, możesz je wybrać z listy.
 - Jeśli rejestrujesz przypadek dla istniejącego pacjenta, kliknij ikonę Lista pacjentów, aby wybrać istniejącego pacjenta.



- W oknie dialogowym Lista pacjentów można zarejestrować nowego pacjenta lub edytować informacje o istniejącym pacjencie.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

AB Search / Contains

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Nazwa przypadku zostanie wypełniona automatycznie, ale możesz ją jeszcze zmienić.
4. Kliknij "Rejestruj & Skanuj", aby zakończyć rejestrację przypadku i przejść do skanowania.
 - **Rejestruj:** Zostaniesz przekierowany na stronę główną. Jest to przydatne podczas rejestrowania wielu przypadków.

- **Rejestruj & Skanuj:** Przejście do zakładki Formularz w celu zarejestrowania formularza informacji dla danego przypadku.

Utwórz przypadek w Work Box (Laboratorium)

1. Kliknij przycisk "Nowy przypadek" w prawym górnym rogu.

The screenshot shows a form titled "New Case Information" with the following fields and controls:

- Clinic Name***: A dropdown menu with a downward arrow icon.
- Patient Name***: A text input field.
- Case Name***: A text input field.
- Requested Delivery Date**: A date picker showing "2023-04-13".
- Tag**: A text area with the placeholder text "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- A note at the bottom left: "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Register".

2. Wprowadź lub wybierz nazwę kliniki.
3. Wprowadź imię i nazwisko pacjenta oraz nazwę przypadku. Nazwa przypadku zostanie wypełniona automatycznie, ale możesz ją jeszcze zmienić.
4. Wpisz przewidywany termin dostawy z uwzględnieniem terminu zakończenia prac.
5. Po zarejestrowaniu przypadku zostaniesz przekierowany na stronę główną.

Edycja przypadków

Edycja przypadku w Case Box (Klinika)

1. Kliknij ikonę "Edytuj" obok nazwy przypadku.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Kliknij ikonę "Szukaj", aby zmienić nazwisko pacjenta. Należy pamiętać, że nie można go edytować bezpośrednio; zamiast tego należy znaleźć nazwę pacjenta, którą chce się zastąpić aktualną i można edytować informacje o pacjencie z listy.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Zaznacz nazwisko pacjenta, którym chcesz zastąpić obecne.
4. Aby utworzyć nowego pacjenta, należy nacisnąć przycisk "Nowy pacjent".
5. Za pomocą przycisku "Edytuj" można zmienić zarejestrowane informacje o pacjencie.
6. Kliknij "Zastosuj", aby zakończyć proces.

Edytuj przypadek w Work Box (Laboratorium)

1. Kliknij ikonę "Edytuj" obok nazwy przypadku.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Kliknij "Zastosuj" po zakończeniu edycji.

Uwaga

Nie możesz edytować informacji o przypadkach otrzymanych poprzez zamówienie w In Box.

Klonowanie przypadków

Klonowanie przypadku w Case Box (Klinika)

1. Kliknij ikonę "Klonuj" u góry.



2. Zostaniesz zapytany, jakie informacje chciałbyś sklonować do nowego przypadku.

Information

 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Wybierz, czy chcesz powielić tylko formularz informacji, czy wszystkie dane.
4. Po zakończeniu klonowania zostanie utworzony przypadek o nazwie "[Nazwa przypadku] - Klonowanie".

Klonowanie przypadku w Work Box (Laboratorium)

1. Kliknij ikonę "Klonuj" u góry.



2. Powiel wszystkie dane, aby stworzyć nowy przypadek.
3. Po zakończeniu klonowania zostanie utworzony przypadek o nazwie "[Nazwa przypadku] - Klonowanie".


Usuwanie przypadku

Usuń przypadek (klinika i laboratorium)

1. Kliknij ikonę "Usuń".



2. Kliknij "OK", aby usunąć przypadek.

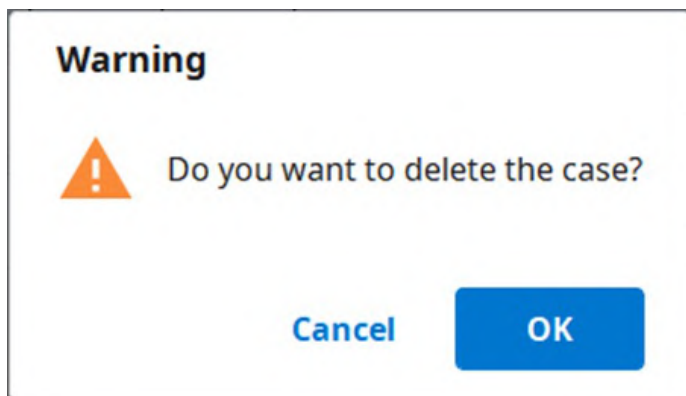

3. Usunięte przypadki są przenoszone do kosza i w razie potrzeby można je odzyskać.

Formularz informacji

Możesz wprowadzić formularz informacji w oparciu o podłączony program i typ leczenia.

Wprowadzone informacje posłużą jako podstawowe informacje do pracy na programach skanujących lub CAD oraz do składania zamówień.

Rejestrowanie formularza informacji w Case Box.

Wprowadź na zakładce Formularz

1. Wybierz, czy informacje o leczeniu mają być wprowadzane według zębów czy według łuków.
2. Wybierz Typ - Metoda - Materiał - Odcień.
 - Jeśli wprowadziłeś informacje nieprawidłowo, wróć, aby wybrać je ponownie.
 - Wybrane informacje są automatycznie rejestrowane na liście zamówień.
3. Kliknij "Zapisz", aby zapisać swoją rejestrację.

Rejestrowanie formularza informacji w Work Box.

Wprowadź na zakładce Formularz


1. Wybierz program do skanowania, którego chcesz użyć.
2. Wybierz jedną z następujących opcji, która określi Twoją strategię skanowania: Zęby/Elastyczne Multi-Die/Multi-Die.
3. Metody mogą się różnić w zależności od wybranego programu skanowania.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Zęby	O	O
Łuk	O	O
Elastyczny multi-die	X	O
Multi-die	X	O

4. Wybierz numery zębów, łuków lub matryc do procesu skanowania.
5. Wybierz Typ - Metoda - Materiał - Odcień.
 - Jeśli wprowadziłeś informacje nieprawidłowo, wróć, aby wybrać je ponownie.
 - Wybrane informacje są automatycznie rejestrowane na liście.
6. Kliknij "Zapisz", aby zapisać swoją rejestrację.

Łączenie zębów do mostu

Można połączyć wiele zębów w most, gdy ten sam materiał zostanie nałożony na wiele sąsiednich zębów. Kliknij ikonę mostu obok wybranych zębów, aby je połączyć lub rozłączyć.

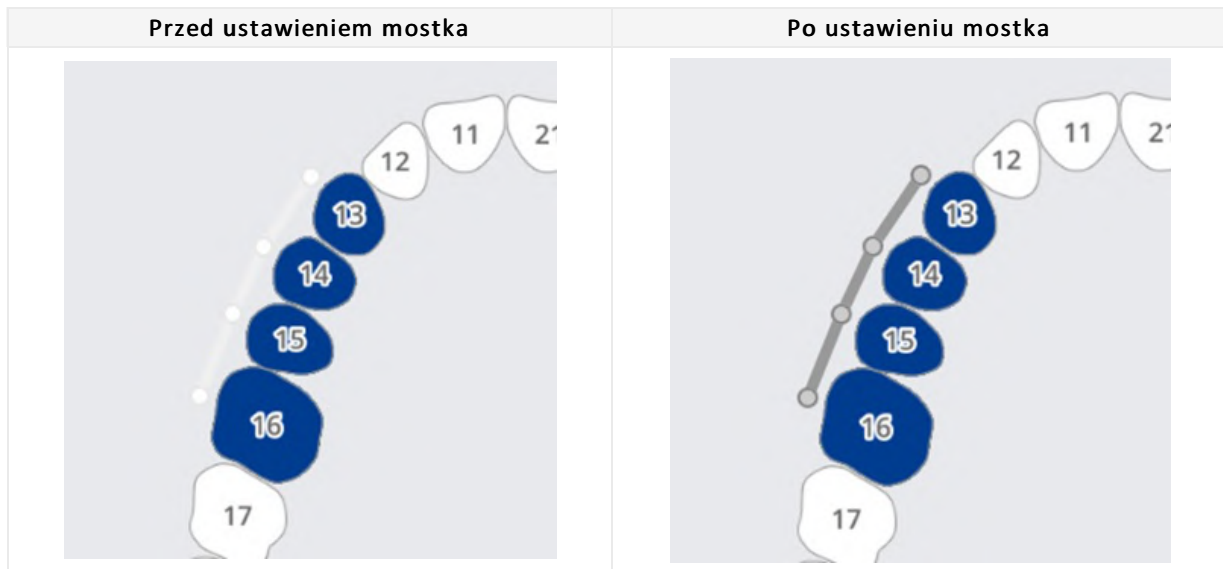

Ustawianie opcji skanowania

W zależności od programu, z którym pracujesz, dostępne są różne opcje skanowania.

Wybrane opcje skanowania są przekazywane do każdego programu skanującego.

Medit Scan for Labs

Ogólne opcje

	Przylegające zęby	Oznacz zęby przygotowane i przylegające, a następnie przekazać te informacje do programu skanującego.
	Przeciwnie	Automatycznie oznacza przeciwnie i przekazuje tę informację do programu skanującego.
	Artykulator	Wyświetlanie opcji wyboru artykulatora w programie do skanowania.
	Znacznik ruchu	Zezwól na użycie strategii skanowania "Ruch szczęki" w programie skanującym.

Opcje według zębów

	Zeskanowany model	Zezwól na ustawienie strategii skanowania organów w programie skanującym.
	Skan przedoperacyjny	Zezwól na ustawienie strategii skanowania modelu przedoperacyjnego w programie skanującym.
	Skanowanie Wax-Up	Zezwól na ustawienie strategii skanowania wax-upów w programie skanującym.

Dodawanie do ulubionych

Możesz szybko wybrać produkt, rejestrując go jako ulubiony.

Lista zarejestrowanych ulubionych jest zarządzana jako szablon i może być udostępniana poprzez funkcje eksportu i importu.

Dodaj do ulubionych

1. Wybierz numer zęba.
2. Wybierz Typ - Metoda - Materiał - Odcień.
 - Typ - Metoda - Materiał - Odcienie mogą być zarejestrowane jako ulubione, nawet jeśli nie wszystkie są wybrane.
3. Kliknij ikonę "Gwiazda".

4. Kombinacja wybranych parametrów, z wyłączeniem numeru zęba, znajduje się na liście ulubionych wyszukiwań.

Zarządzaj ulubionymi szablonami

Możesz rejestrować, zarządzać i udostępniać różne typy szablonów.

Dodaj	Dodaj nowy szablon.
Zmień nazwę	Zmień nazwę bieżącego szablonu.
Usuń	Usuń bieżący szablon.
Eksportuj	Eksportuj bieżący szablon do pliku.
Importuj	Importuj plik szablonu.

Praca nad Skanowaniem/CAD

Proces skanowania

Na podstawie wprowadzonych informacji przystępujesz do skanowania.

1. Wprowadź/zapisz informacje o leczeniu i wybierz niezbędne opcje skanowania.
2. Kliknij przycisk "Skanuj" w prawym górnym rogu okna.

Proces CAD


Medit Link zapewnia aplikację integracyjną DentalCAD do połączenia Medit Link z DentalCAD.

1. Zainstaluj aplikację DentalCAD Integration w App Box.
2. Przejdź do szczegółów przypadku i kliknij ikonę aplikacji DentalCAD Integration w Szybkim uruchamianiu.
3. Określ ścieżkę do aplikacji DentalCAD zainstalowanej na komputerze w wyskakującym oknie dialogowym.
4. Wprowadź szczegóły zeskanowanego przypadku i kliknij ikonę aplikacji DentalCAD Integration, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego w celu utworzenia pliku dentalProject.
5. Zarejestruj formularz informacji dla DentalCAD i kliknij "Otwórz", aby otworzyć program CAD.
6. Jeśli zainstalujesz aplikację DentalDB Integration, wyniki CAD zostaną automatycznie dostarczone do określonej ścieżki zapisu w exocad. (tylko konta laboratorium)


Korzystanie z aplikacji Add-in

Dodatek Szybkie uruchamianie

Możesz bezpośrednio uruchamiać różne aplikacje dodatkowe, klikając ikony zainstalowanych aplikacji w Szybkim uruchamianiu. Kolejność ikon aplikacji można zmieniać, przeciągając je.

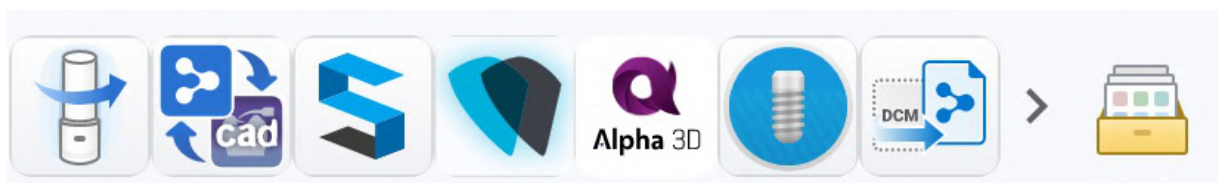

Zarządzanie uruchamianiem aplikacji

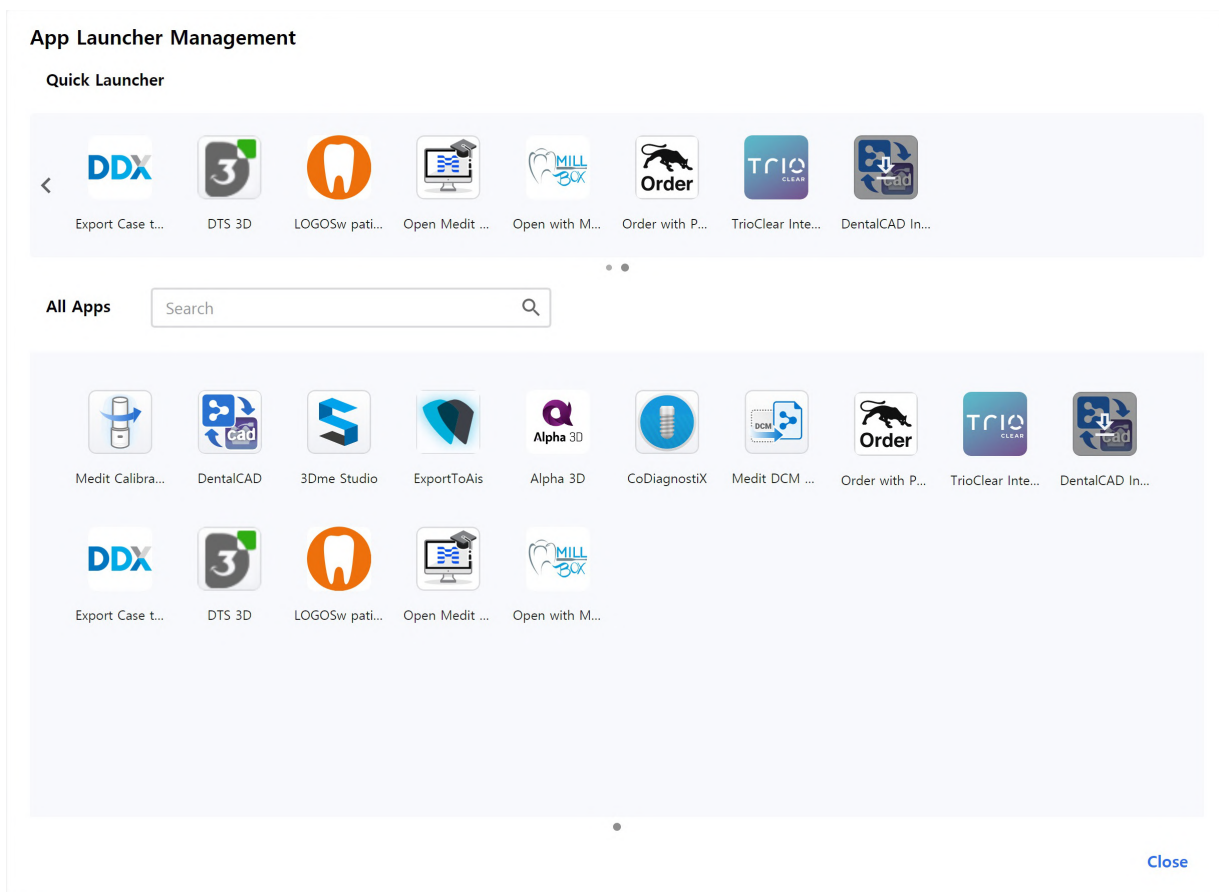

Szybkie uruchamianie

Możesz określić, które aplikacje będą wyświetlane w Szybkim uruchamianiu. Możesz zmienić kolejność ikon aplikacji, przeciągając je, lub utworzyć foldery, aby pogrupować podobne aplikacje w celu ich uporządkowania.

Wszystkie aplikacje

Wyświetlane są wszystkie zainstalowane aplikacje. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji, aby dodać ją do Szybkiego uruchamiania. Z menu kontekstowego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy możesz również wybrać uruchomienie, zainstalowanie lub odinstalowanie aplikacji.

Uzyskaj pliki wyników

Eksportuj pliki z wynikami skanowania

Dodatkowo, oprócz dzielenia się wynikami z partnerami poprzez zamówienia, Medit Link pozwala na przechowywanie plików z wynikami w wybranym formacie za pomocą funkcji eksportu.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

[Preview](#)

Close


Export

120

Eksportuj pliki do	Określ ścieżkę, gdzie mają być przechowywane pliki wyników.
Nazwa folderu	System tworzy nowy folder i przechowuje w nim wszystkie pliki wyników. Domyślna nazwa folderu jest ustawiana przez regułę nazewnictwa. Ale możesz zmienić nazwę folderu bezpośrednio. Możesz zdefiniować regułę nazewnictwa w Ustawienia > Opcje eksportu > Reguły dla nazwy folderu.
Nazwa pliku	Ustaw nazwę pliku dla wyniku. Reguła nazewnictwa ustawia domyślną nazwę pliku. Ale możesz zmienić nazwę pliku bezpośrednio. Możesz określić regułę nazewnictwa poprzez Ustawienia > Opcje eksportowania > Reguły dla nazwy pliku.
Typ	Wybierz program do projektowania, którego chcesz użyć. Medit Link automatycznie dostosuje pliki zgodnie z Twoim wyborem, umożliwiając kontynuowanie projektowania bez konieczności dodatkowego dopasowywania osi.
Format siatki	Określ format pliku siatki.
Format obrazu	Określenie formatu eksportowanych plików obrazów.
Kompresja plików	Kompresuj wszystkie wyniki do jednego pliku.
Połącz indywidualną siatkę	Połącz wynik szczęki lub żuchwy z indywidualnym zębem. Jest to przydatne, gdy import kilku plików do programu nie jest możliwy.
Eksportuj wszystkie relacje okluzyjne	Kiedy wiele wyników okluzji jest generowanych z aplikacji skanującej, można wyeksportować wszystkie wyniki okluzji jednocześnie.
Zapisz informacje o przypadku w formacie PDF	Zapisz informacje o przypadkach jako PDF z wynikiem.

Eksportuj pliki wyników z Listy przypadków

Możesz eksportować pliki wyników przypadku lub wielu przypadków jednocześnie za pomocą opcji "Eksportuj" znajdującej się nad listą przypadków w Case Box i Work Box.

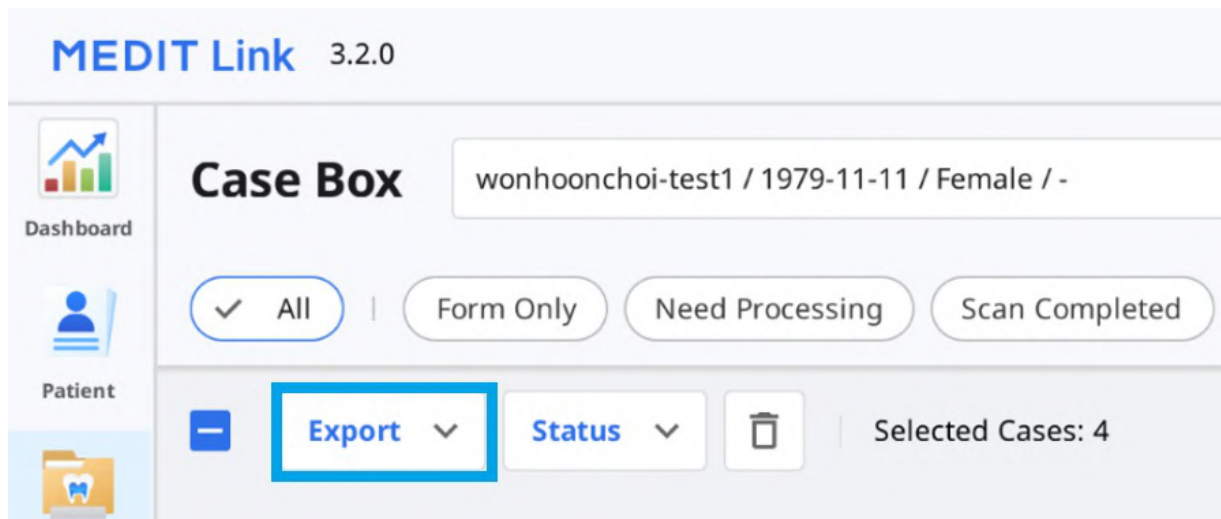

1. Przejdź do Case Box lub Work Box.
2. Wybierz z listy wszystkie przypadki, których pliki wyników chcesz wyeksportować.

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 Status ▾ |
 |
 Selected Cases: 4

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

Dashboard
 Patient
Case Box
 Order Box
 Case Talk
 App Box

3. Kliknij "Eksportuj" i wybierz "Pliki wyników".

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. Ustaw folder docelowy, typ pliku, format siatki i format obrazu, a następnie wybierz opcje eksportu w zakładce "Opcje".

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type 

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

Uwaga

Pola "Nazwa folderu" i "Nazwa pliku" nie są edytowalne podczas eksportowania plików dla wielu przypadków.

Nazwa folderu i nazwa pliku są tworzone automatycznie zgodnie z regułami ustawionymi dla opcji "Reguła dla nazwy folderu" i "Reguła dla nazwy pliku" w Ustawienia > Opcje eksportowania.

- Kliknij "Eksportuj".
- Kliknij "Tak", aby otworzyć folder, w którym zapisane są pliki.

Question




Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Eksportuj pliki wyników z Przeglądarki plików

Możesz wyeksportować pliki wyników skanowania dla przypadku za pomocą ikony "Eksportuj" w prawym górnym rogu zakładki Przeglądarka plików.

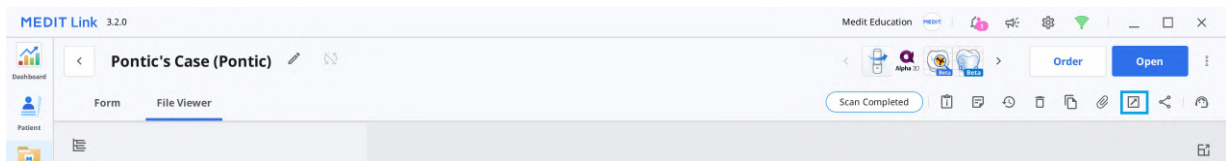

1. Przejdź do Case Box lub Work Box.
2. Kliknij, aby otworzyć przypadek z listy.
3. Kliknij ikonę "Eksportuj" w prawym górnym rogu zakładki Przeglądarka plików.



4. Ustaw folder docelowy, nazwę folderu, nazwę pliku, typ pliku, format siatki i format obrazu, a następnie wybierz opcje eksportu w zakładce "Opcje".

5. W zakładce "Lista plików" możesz wybrać wymagane pliki dla przypadku, odznaczając niepotrzebne.

Export Files in This Case

Options

File List

☒

☒

Maxilla

☒ Base

☒

Mandible

☒ Base

☒

Occlusion

☒ First Occlusion
☒ Second Occlusion

☒

Dynamic Occlusion

☒

Free

☒ Maxilla
☒ Mandible

☒

Face Scan Data

☒ Face Scan Data

Close

Export

6. Kliknij "Eksportuj".
7. Kliknij "Tak", aby otworzyć folder, w którym zapisane są pliki.

Question

?

Exporting successfully completed.


Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Eksportuj pliki wyników z Drzewa danych


Możesz wyeksportować plik lub pliki w określonej grupie danych z rozwiniętego menu w przeglądarce plików.

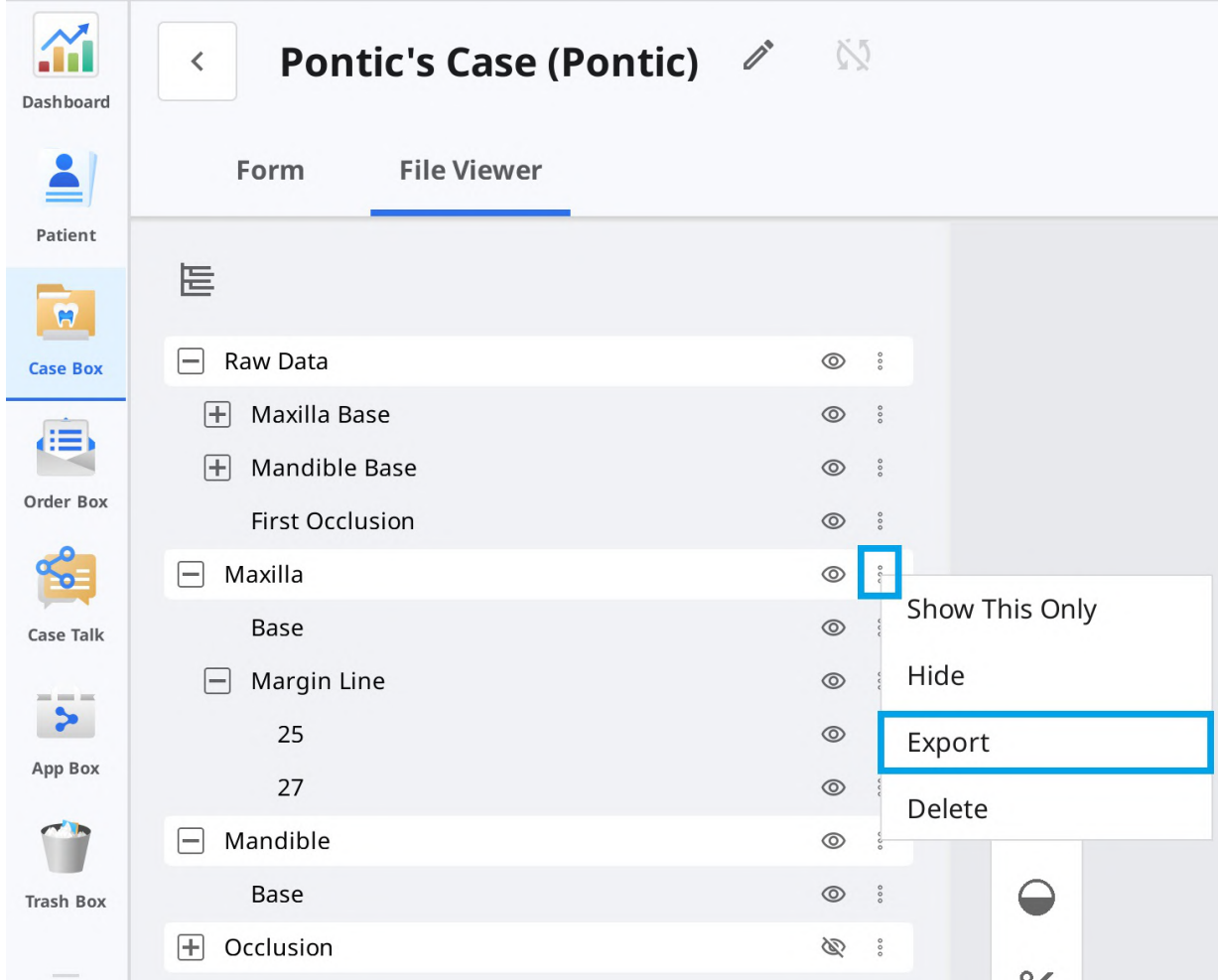

1. Przejdź do Case Box lub Work Box.
2. Kliknij, aby otworzyć przypadek z listy.
3. Kliknij ikonę trzech kropek obok grupy danych lub podmiotu w drzewie danych w zakładce Przeglądarka plików.



4. Następnie kliknij "Eksportuj".

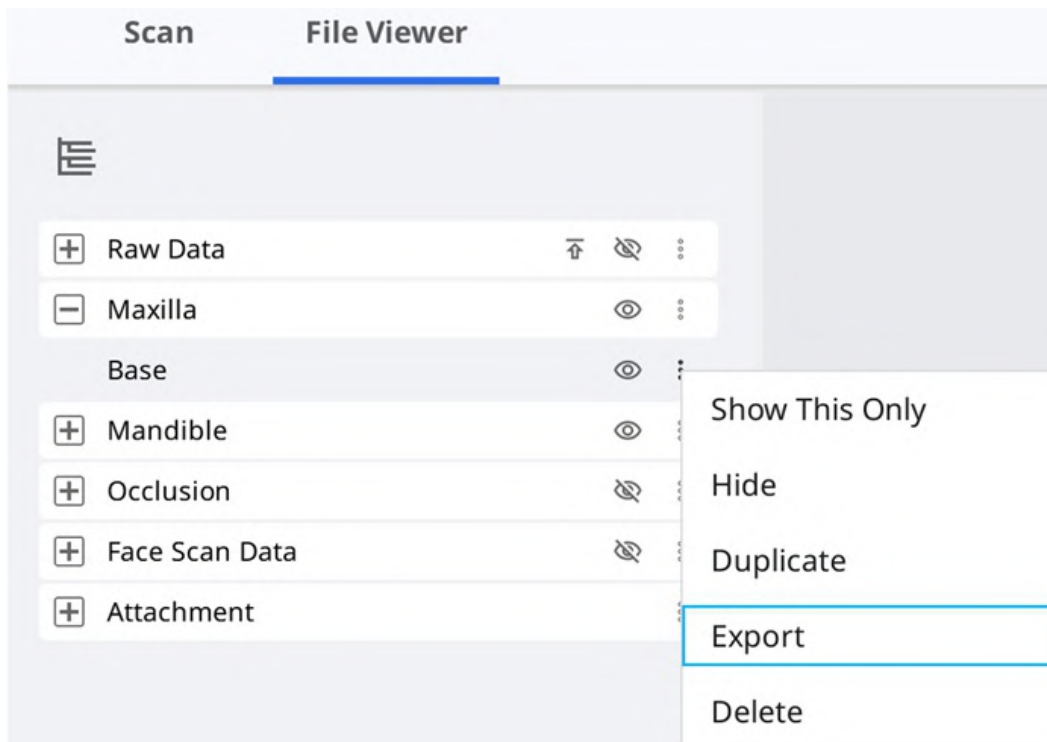

5. Ustaw folder docelowy, nazwę folderu, nazwę pliku, typ pliku, format siatki i format obrazu, a następnie wybierz opcje eksportu w zakładce "Opcje".

Export files in case

Options
File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close
Export

6. Możesz zobaczyć, że tylko pliki wybrane w drzewie danych są zaznaczone na Liście plików.

Export Files in This Case

Options **File List**

- ☐ Maxilla
 - ☐ Base
- ☒ Mandible
 - ☒ Base
- ☐ Occlusion
 - ☐ First Occlusion
 - ☐ Second Occlusion
- ☐ Dynamic Occlusion
- ☐ Free
 - ☐ Maxilla
 - ☐ Mandible
- ☐ Face Scan Data
 - ☐ Face Scan Data

Close Export

7. Kliknij "Eksportuj".
8. Kliknij "Tak", aby otworzyć folder, w którym zapisane są pliki.

Question

? Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

Eksportuj listę przypadków jako CSV

Medit Link udostępnia funkcję eksportu listy przypadków w formacie CSV.

Możesz eksportować listę przypadków z podstawowymi informacjami i łatwo zarządzać przypadkami.

1. Przejdź do Case Box, Order Box, In Box lub Work Box.
2. Wybierz przypadki, które chcesz wyeksportować.


MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi Clinic

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - +2

Export Status Selected Cases: 4 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-19 오전 11:00			
Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:15			
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:10	2023-08-18 오전 9:00		

3. Kliknij "Eksportuj" i wybierz "Lista przypadków (jak pokazano)" lub "Lista przypadków (ze wszystkimi pozycjami)".

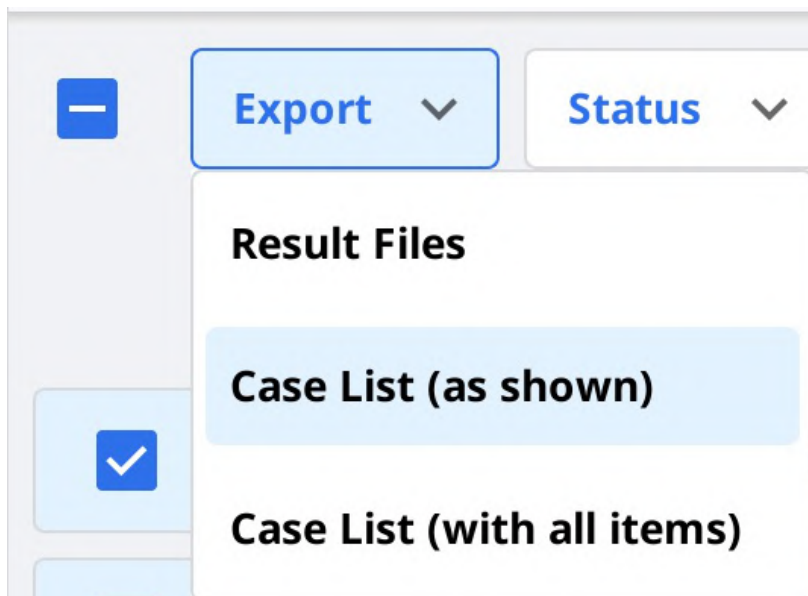

Uwaga

Lista przypadków (jak pokazano): Eksport listy przypadków z aktualnie wyświetlanymi elementami na ekranie. Przejdź do Przeglądaj opcje > Pozycje tabeli, aby wyświetlić lub ukryć pozycje według własnego uznania.

Lista przypadków (ze wszystkimi pozycjami): Eksport listy przypadków ze wszystkimi pozycjami, w tym Status, Nazwa przypadku, Data urodzenia, Formularz informacji, Data ostatniej modyfikacji, Data skanowania, Data zamówienia i Nazwa laboratorium.

4. Zdefiniuj ścieżkę i nazwę pliku, a następnie zapisz listę.
5. Lista przypadków jest zapisywana jako plik CSV.

Eksport linii brzegowej


Medit Scan for Clinics zapewnia funkcję tworzenia linii brzegowej, a Medit Link może przenieść linię brzegową do programu CAD.

Eksportuj linię brzegową jako kolor

Ogólnie rzecz biorąc, Medit Link konwertuje linię brzegową jako kolor i eksportuje wynik ze szczęką lub żuchwą razem. Możesz utworzyć linię brzegową w programie cad, odwołując się do informacji o kolorze.

Przykład:

Szczeka

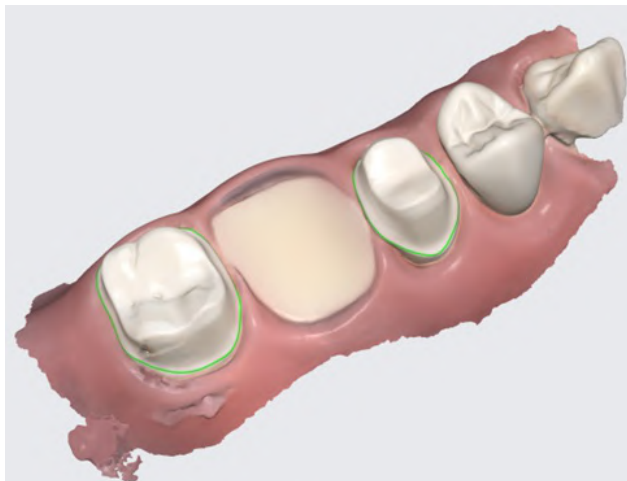

Wynik z liniami brzegowymi jako informacją w kolorze.

Uwaga

Ta funkcja jest dostępna dla formatów zawierających informacje o kolorze, takich jak meditMesh, OBJ i PLY. Linia brzegowa nie konwertuje się do STL.

Uwaga

Typ > 3Shape nie obsługuje tej funkcji.


Eksportuj linię brzegową jako plik

W przypadku programu Exocad, Medit Link eksportuje linię brzegową do pliku "~margin.xyz", który można zaimportować bezpośrednio do programu Exocad.

Możesz użyć tego pliku w exocad bez dodatkowej pracy.


Przykład:

Szczeka

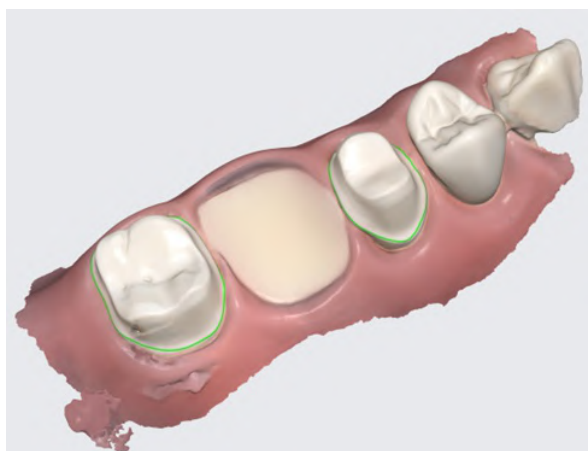

Wynik z liniami brzegowymi jako informacją w kolorze.

Linia brzegowa

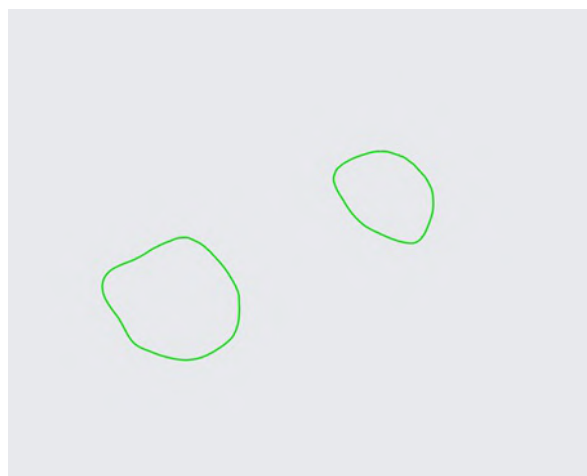

Linia brzegowa eksportowana jako osobne pliki

Pobierz pliki z Medit Link Web

Medit Link udostępnia funkcję pobierania plików.

Jeśli chcesz uzyskać pliki wynikowe bez instalowania aplikacji Medit Link, możesz pobrać pliki z serwisu internetowego Medit Link.

Uwaga


Dane należy wgrać do Medit Cloud, aby pobrać pliki z sieci.

Funkcja pobierania jest dostępna w poniższym menu serwisu internetowego Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

W prawym górnym rogu znajduje się przycisk "Pobierz".

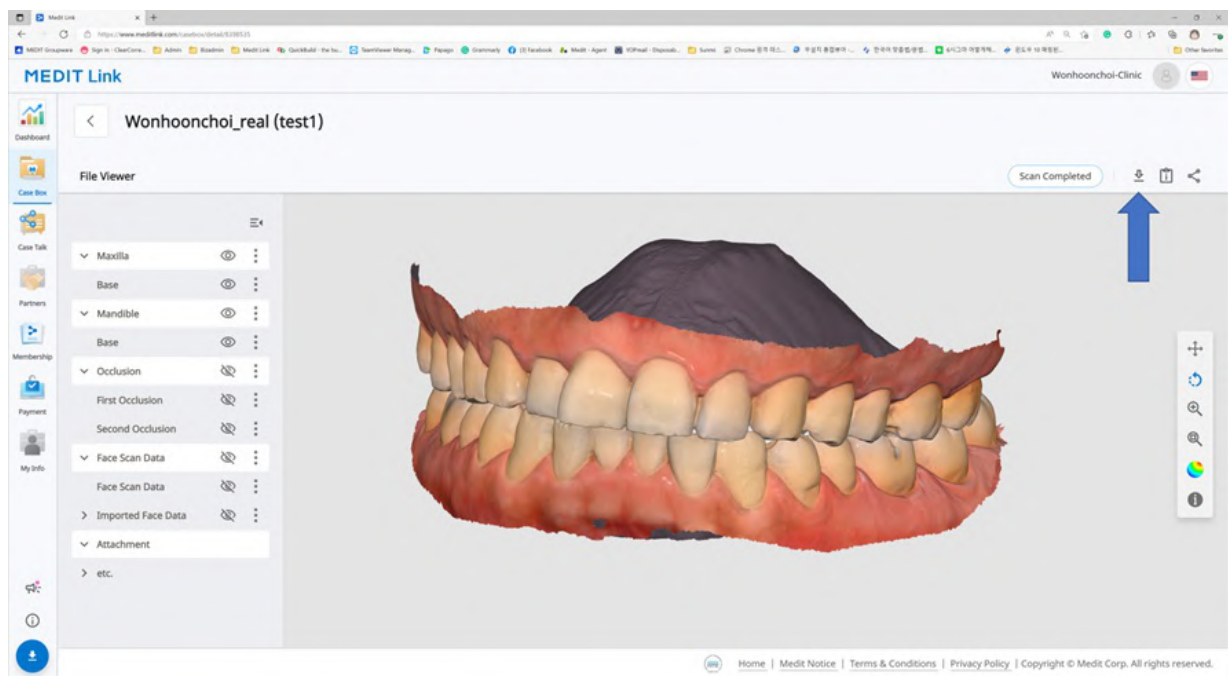

Web Viewer

Gdy udostępniasz przypadek za pomocą Case Talk, możesz ustawić, czy zezwolić na pobieranie, czy nie.

Jeśli zaznaczysz "Udzielenie pozwolenia na pobranie" i udostępnisz przypadek, wszyscy użytkownicy, którzy połączą się z udostępnionym linkiem, mogą pobrać pliki.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: [] PIN Code [Enter PIN Code]

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

W przeglądarce internetowej w prawym górnym rogu znajduje się ikona "Pobierz".

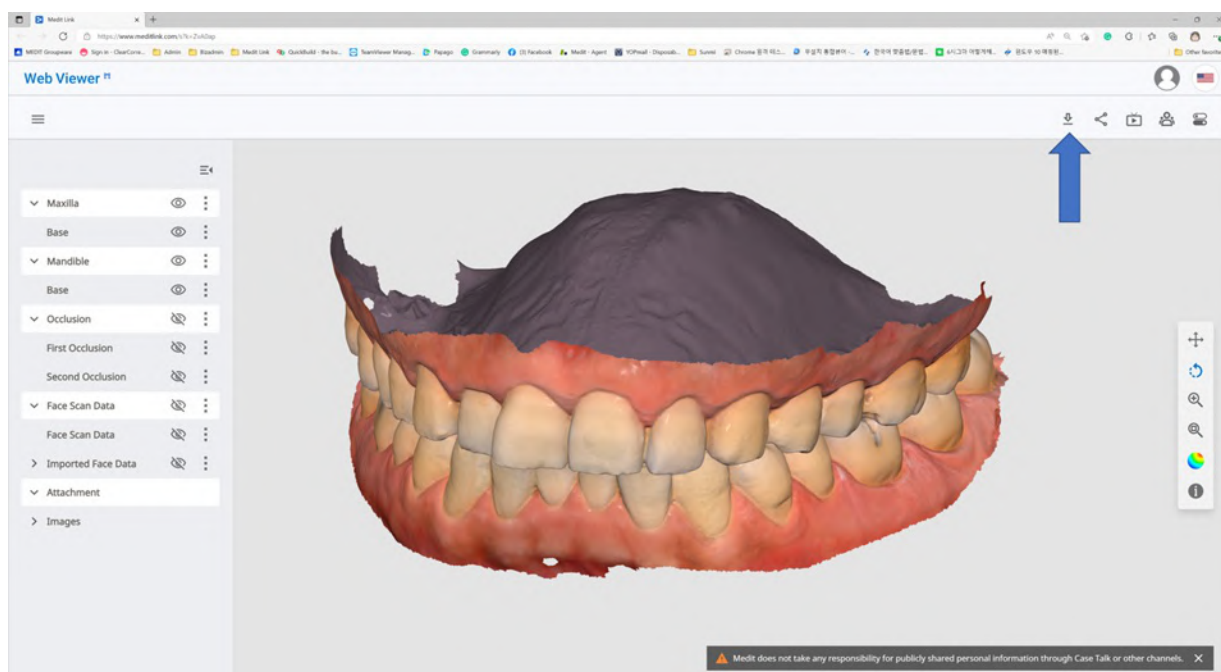

1. Kliknij "Pobierz".



2. Wybierz format siatki w oknie dialogowym pobierania.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close **OK**

3. Następnie kliknij "OK".

133

Zamówienie/Zarządzanie zamówieniami

W prosty sposób można zamówić przypadek z danymi pozyskanymi z połączonych programów i dołączonymi przez użytkownika.

Zamawianie przypadków

Możesz złożyć zamówienie dla swoich partnerów w Case Box.

1. Kliknij przycisk "Zamów".
2. Sprawdź informacje wymagane dla Twojego zamówienia.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name: mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name: Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date: 2023-04-13

Delivery Time: 오전 8:15 (Slider from AM 8:00 to PM 8:00)

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order


Cancel OK

3. Wybierz partnera.
4. Sprawdź informacje o produkcie z zakładki Lista zamówień.
 - Możesz zdecydować, czy udostępnić nazwisko pacjenta.
5. Zaznacz pliki do zamówienia z zakładki Lista plików.
6. Wprowadź pożądaną datę dostawy.
 - Domyślnie ustawiona jest wartość 7 dni od daty zamówienia.
7. Możesz dodać notatkę i tagi dla swojego partnera, aby nakreślić konkretne szczegóły.
8. Kiedy z aplikacji skanującej generowanych jest wiele wyników okluzyjnych, możesz wysłać wszystkie wyniki

- okluzyjne jednocześnie, zaznaczając opcję "Zamów Uporządkuj wszystkie relacje okluzyjne".
9. Kontynuuj swoje zamówienie.


Potwierdź zamówienie (In Box)

- Zaakceptuj zamówienie po jego otrzymaniu.
- Zaakceptowane zamówienia zostaną przekazane do Work Box.

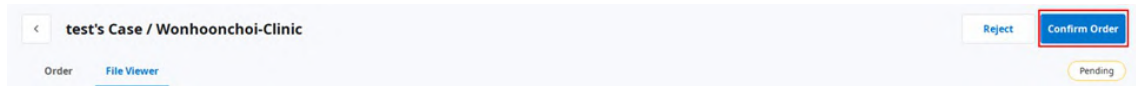


Anuluj zamówienie (Order Box)

- Możesz anulować zamówienie zanim Twój partner je zaakceptuje.
- Anulowane przypadki mogą zostać ponownie zamówione.

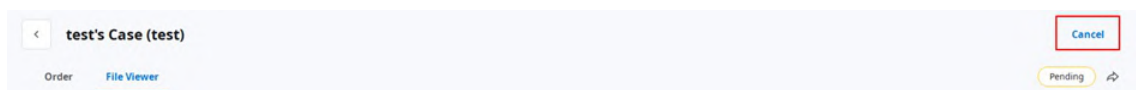


Odrzucenie zamówienia (In Box)

- Możesz odrzucić otrzymane zamówienie.
- Odrzucone przypadki mogą zostać ponownie zamówione.

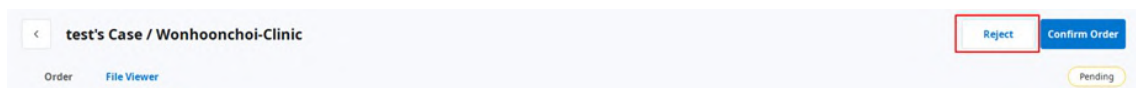

Sprawdzanie zamówionych przypadków

Możesz sprawdzić szczegóły zamówionego przypadku w Order Box na koncie kliniki. Możesz również sprawdzić przypadek, który otrzymałeś z In Box na koncie laboratorium.

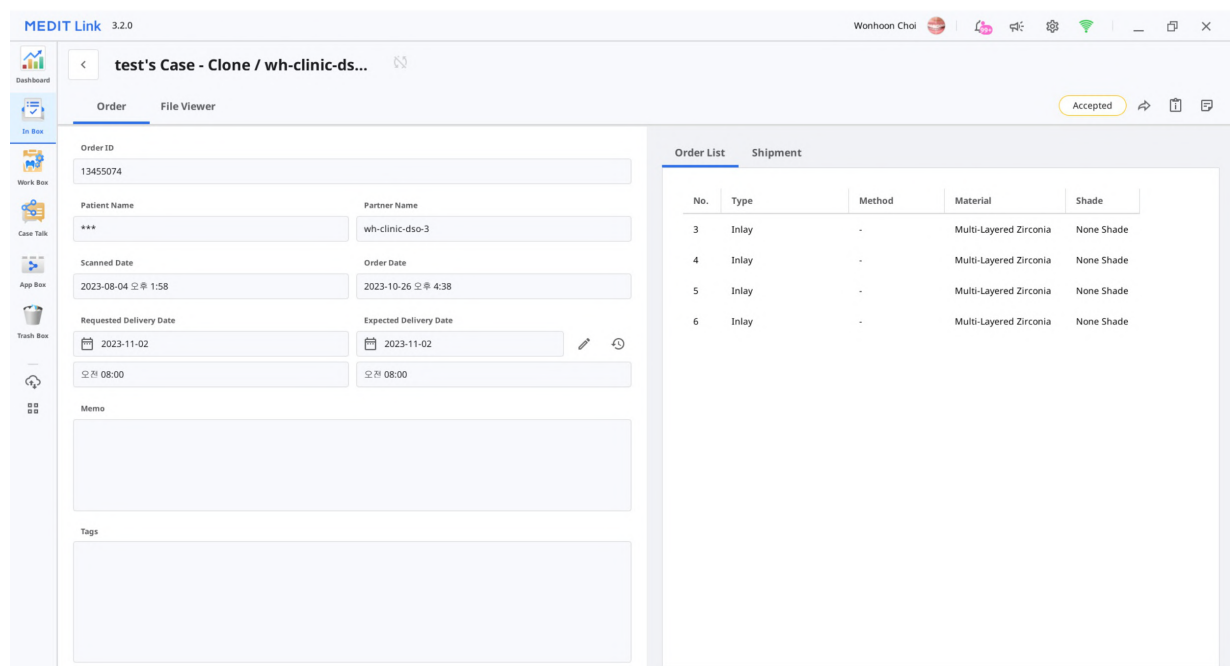

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Informacje o zamówieniu	Informacje, które mogą być zawarte w zamówieniu, są następujące: ID zamówienia/nazwa pacjenta/nazwa konta/data skanowania/data zamówienia/data dostarczenia/data wymagalności dostawy/notatka. Możesz sprawdzić szczegóły dotyczące zamówionego produktu i informacje o dostawie.
Lista zamówień	Na liście zamówień wyświetlane są szczegóły dotyczące zamówionego produktu.
Wysyłka	Wprowadź/sprawdź informacje dotyczące wysyłki.

Wprowadzanie informacji o przesyłce (In Box)

Wprowadź informacje o wysyłce zakończonego przypadku i rozpocznij wysyłkę.

1. Kliknij zakładkę Przesyłka.
2. Wprowadź informacje o przesyłce i kliknij "Zarejestruj".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Wprowadzone informacje są wysyłane do partnera.

Zarządzanie terminem dostawy

Możesz ustawić oczekiwaną datę dostawy podczas składania zamówienia, a informacja ta zostanie przekazana Twojemu partnerowi.

Ustawianie wnioskowanej daty dostawy (konto kliniki)

- Przy zamówieniu w Case Box można wpisać wnioskowany termin dostawy.

Order

General **Order List** File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Domyślna wartość to 7 dni od daty złożenia zamówienia.
- Wpisz datę/godzinę, w której chcesz otrzymać produkty i przejdź do zamówienia.
- Możesz łatwo ustawić czas za pomocą suwaka.

Ustawianie przewidywanej daty dostawy (konto laboratorium)

- Możesz wprowadzić przewidywaną datę dostawy dla przypadku zamówionego w In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order List Shipment

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오전 7:56

Order Date
2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Memo
<Scanbody Library>
16: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14: ODENTIS_Custom_(JNMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0


1. Sprawdź wnioskowany termin dostawy z partnerem i zmień termin za pomocą przycisku "Edytuj".



2. Wprowadź przewidywaną datę dostawy biorąc pod uwagę faktyczny dzień roboczy. W razie potrzeby

możesz też zostawić komentarz.

3. Kliknij "Zastosuj".

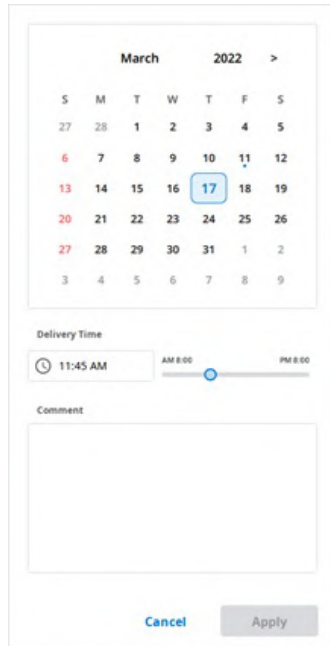

The screenshot shows a mobile application interface for selecting a delivery date and time. At the top, there is a calendar for March 2022. The date 17 is highlighted with a blue circle. Below the calendar, there is a 'Delivery Time' section with a clock icon and a time picker set to 11:45 AM. A slider below the time picker allows selection between AM 8:00 and PM 8:00. Underneath, there is a 'Comment' section with a text input field. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'Apply'.

4. Przewidywany termin dostawy oraz notatka zostaną przekazane wraz z zamówieniem.

- Możesz sprawdzić datę i notatki w Order Box.
- Możesz zmienić przewidywaną datę dostawy, a zmiany zostaną przekazane Twojemu partnerowi.

5. Możesz sprawdzić historię przypadków za pomocą przycisku "Historia".



Zakończenie przypadku

Zakończ (Work Box/In Box)


Gdy wszystkie zadania zostaną wykonane, kliknij "Gotowe", aby zakończyć przypadek.

Zakończ przypadek z opcji szczegóły przypadku

Możesz znaleźć ikonę trzech kropek po prawej stronie od przycisku "Otwórz" lub "Skanuj ponownie".




Zakończ pracę, klikając ikonę i wybierając "Done".

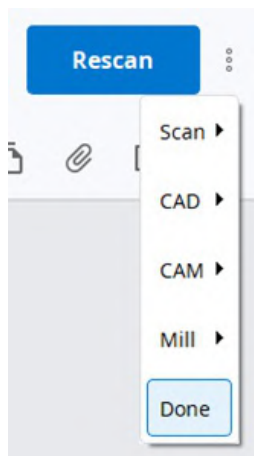

Zakończ wiele przypadków z listy przypadków

1. Przejdź do Work Box.
2. Wybierz wszystkie przypadki do zakończenia.

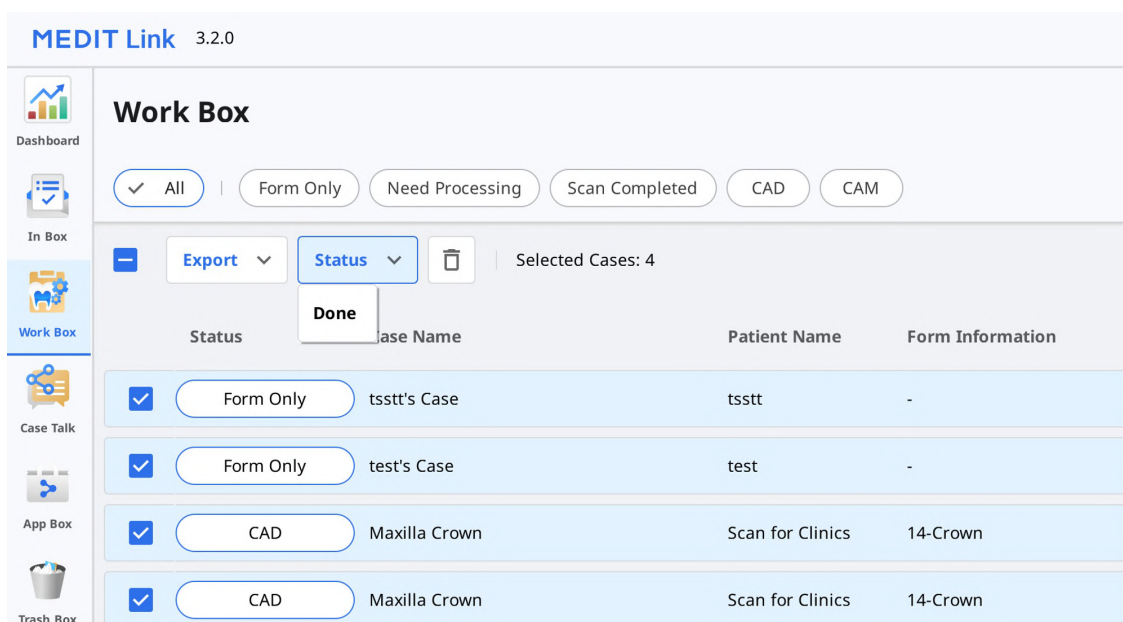


3. Kliknij "Status" i wybierz "Done".

Zakończ (Case Box/Order Box)

Po zakończeniu przypadku po stronie laboratorium, klinika musi potwierdzić przypadek, aby zakończyć cały proces zamówienia.

Klinika może znaleźć przycisk "Potwierdź dostarczenie" w Order Box, jeśli laboratorium zakończy swoją pracę.

Kliknij to, cały proces zamówienia zostanie zakończony, a status przypadku zostanie zmieniony na "Case Completed".

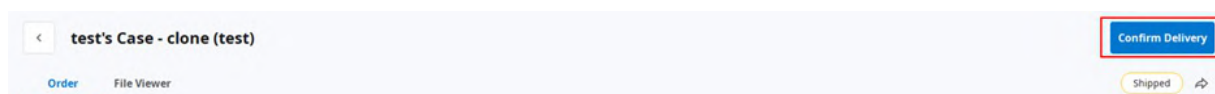

Zakończ nie zamówiony przypadek w Case Box.

Dla przypadków, które nie zostały zamówione do Laboratorium, możesz zakończyć je w Case Box.

1. Przejdź do Case Box.

2. Wybierz przypadek, który chcesz zakończyć.

The screenshot shows the 'Case Box' interface. On the left is a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box (selected), Order Box, Case Talk, and App Box. The main area has a header 'Case Box' with a 'Patient' dropdown. Below the header are filter buttons: 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Cas'. A toolbar contains an expand/collapse icon, an 'Export' button, a 'Status' dropdown (open), and a trash icon. The 'Status' dropdown menu shows 'Case Completed' as the selected option. Below the toolbar, a table lists cases. The first row is 'Ordered' and not selected. The next four rows are 'Scan Completed' and selected. The text 'Selected Cases: 4' is displayed to the right of the toolbar.

	Status	Case Name
☐	Ordered	test
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1
☒	Scan Completed	test test(1234)
☒	Scan Completed	test
☒	Scan Completed	test

3. Kliknij "Status" i wybierz "Case Completed".

Komunikuj się za pomocą tagów

Możesz dodać dodatkowe informacje dotyczące przypadku za pomocą tagów i wysłać je do swoich partnerów.

Dodaj tagi podczas tworzenia nowego przypadku

Możesz wprowadzić tagi podczas tworzenia nowego przypadku lub edytowania informacji o nim.

New Case Information

Patient Name*


Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

Możesz łatwo wyszukiwać i wybierać tagi, których używałeś wcześniej.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

Dodaj tagi podczas składania zamówienia

Możesz sprawdzać i edytować tagi w oknie dialogowym Zamówienie podczas składania zamówienia.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Sprawdź tagi w Szczegółach przypadku.

