

USER GUIDE

Medit Link (Revision 10) 2025.03.18

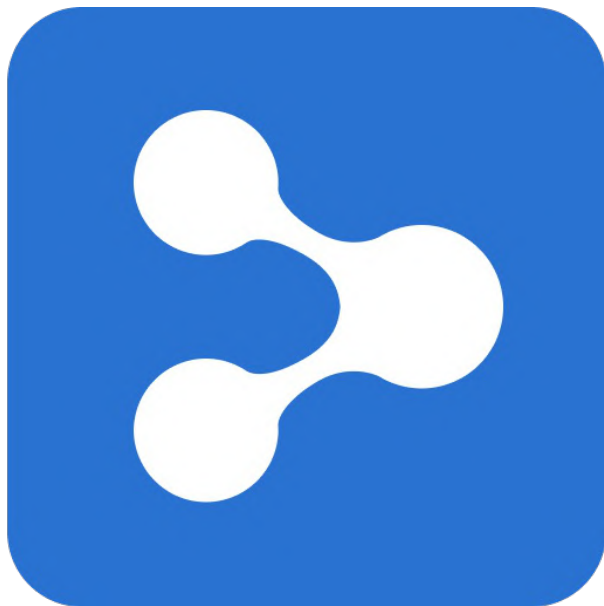


Table of Contents

Medit Link

Introducere	7
Medit Link	7
Prezentare generală Servicii	7
Serviciu cloud	8
Platforma de gestionare a fluxurilor de lucru cu sistem de comandă	9

Medit Link > Instalare

Cerințe de sistem	10
Cerințe sistem pentru Windows	10
Cerințe sistem pentru macOS	10
Cerințe de sistem pentru serviciul web	10
Recomandat pentru browsere	10
Minimum pentru dispozitive mobile	10
Instalare pe Windows	11
Instalare pe macOS	14

Medit Link > Noțiuni introductive

Înregistrare și conectare	18
Site web Medit Link	18
Înregistrează-te	18
Pagina de autentificare și de bun venit	21

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	24
Prezentare generală Dashboard	24
Medit Insights	24
Abonează-te la Medit Insights	25
Dezabonare Medit Insights	26
Patient	27
Caută pacient	27
Case Box/Work Box	28
Filtrare caz	28
Filtrează după pacient	28
Filtrează după statut	31
Filtrare după durată	31
Filtrare după căutare	32
Detalii caz	32
Order Box/In Box	34
Detalii comandă	34
File în Order Box/In Box	34
Case Talk	35
Crearea unui Case Talk	35
Setarea tipului de permisiune de partajare și a opțiunilor de partajare	36
Detalii Case Talk	38
Web Viewer	39
Adnotare	40
Comentarii	42

Partajarea ecranului în timp real	42
Arbore de date	42
Controale arbore de date	42
Controalele modelului 3D	43
Partners	45
Caută parteneri	45
Lista mea de parteneri	45
Invitarea partenerilor	46
Membership	47
Abonament	47
Medit Cloud Storage Plan	47
Spațiu de stocare Cloud	49
Abonează-te	49
Anulează abonarea	51
Abonamentul meu	52
Detalii	53
Reabonare	53
Cum să adaugi o metodă de plată	54
Cum să schimbi o metodă de plată	55
Răscumpără	55
Detalii	56
Înregistrează codul răscumpărării	56
Activează codul de răscumpărare	57
Detalii Plată	57
Vezi detalii factură	58
My Info	60
Contul meu	60
Clinica mea/Laboratorul meu (Doar cont administrator)	60
Scannerul meu	61
Alt meniu	64
Aviz & actualizare	64
Site-uri web conexe	64
Descarcă Medit Link App	65
 Medit Link > Medit Link App	
Prezentare generală	66
Tabelul de mai jos rezumă meniurile disponibile în fiecare tip de cont de clinică și de laborator.	66
Bară de titlu	67
Informațiile mele	67
Notificări	67
Aviz & actualizare	68
Setări	68
Starea rețelei	69
Setări	71
General	71
Managementul stocării	72
Setează perioada	73
Stocare locală	73
Spațiu de stocare Cloud	73
Setează programul conectat	74
Opțiuni de export	74
Instrument de conversie a cazurilor	76

Exportă caz	77
Importă caz	78
Opțiuni proxy	80
Despre	80
Manualul utilizatorului	81
Meniu	82
Dashboard	82
Patient	82
Adaugă pacient nou	83
Șterge pacienți	83
Combină pacienți	84
Case Box/Work Box	84
File în Case Box/Work Box	85
Funcții în Case Box/Work Box	85
Order Box/In Box	86
File în Order Box/In Box	87
Case Talk	87
App Box	88
Tot	88
Medit Apps	88
Descărcat	89
Trash Box	89
Manager sincronizare caz	90
Încarcă	90
Descarcă	91
Site-uri web conexe	91
Vizualizare fișier	93
Arbore de date	93
Instrumente de control model	93
Controalele modelului 3D	94
Control imagine 2D	95
Instrumente funcții	95
Captura imaginii și Memo	95
Captură orto	96
Umple găuri	97
Decupare	98
Optimizează alinierea ocluziei	100
Mișcarea mandibulară	103
Gestionează datele Ocluzie multiplă în Vizualizare fișier	103
Cum se gestionează mai multe rezultate	103
Vizualizează opțiuni	105
Statut filtre	105
Vezi tip	106
Grupare	106
Sortare	106
Filtrare și Caută	108
Filtrează după pacient	108
Filtrează după dată	109
Capacități de căutare avansată	110
 Medit Link > Flux de lucru	
Creează/Editează/Clonează/Șterge caz	111

Crearea de cazuri	111
Creează un caz în Case Box (Clinică)	111
Crearea unui caz în Work Box (Laborator)	112
Editare cazuri	112
Editare cazuri în Case Box (Clinică)	112
Editează cazuri în Work Box (Laborator)	113
Clonarea cazurilor	114
Clonarea cazurilor în Case Box (Clinică)	114
Clonarea cazului în Work Box (Laborator)	114
Ștergerea cazurilor	115
Șterge caz (clinică și laborator)	115
Informații formular	116
Înregistrarea Informațiilor formular în Case Box	116
Introdu în fila Formular	116
Înregistrarea Informațiilor formular în Work Box	116
Introdu în fila Formular	116
Conectarea dinților în punte	116
Setarea opțiunilor de scanare	117
Medit Scan for Labs	117
Opțiuni generale	117
Opțiuni în funcție de dinți	117
Adăugare la favorite	118
Adaugă la favorite	118
Gestionează șabloanele favorite	118
Lucrează la scanare/CAD	119
Proces de scanare	119
Proces CAD	119
Utilizează aplicații add-in	119
Supliment Lansare rapidă	119
Administrarea lansatorului de aplicație	119
Lansare rapidă	120
Toate aplicațiile	120
Obține fișierele de rezultate	121
Exportă fișierele de rezultate ale scanării	121
Exportă fișierele rezultate din Lista cazurilor	122
Exporte rezultate fișier din Vizualizare fișier	125
Exportă rezultate fișiere din Arborele de date	126
Exportă lista de cazuri ca CSV	129
Exportă Linia marginală	130
Exportă linia marginală ca o culoare	130
Exportă linia marginală ca fișier	131
Descarcă fișiere de pe Medit Link Web	131
Case Box/Work Box	132
Web Viewer	132
Comandă/gestionează comenzi	135
Comandarea cazurilor	135
Confirmă comanda (In Box)	136
Anulează comanda (Order Box)	136
Refuză comanda (In Box)	136
Verificarea cazurilor comandate	136
Introducerea informațiilor despre expediție (In Box)	137
Gestionarea datei de livrare	137

Setarea datei de livrare solicitate (cont clinică)	137
Setare Data estimată de livrare (cont Laborator)	138
Finalizarea cazului	139
Complet (Work Box/In Box)	139
Completează un caz din detaliile cazului	139
Completează cazurile multiple din lista de cazuri	140
Complet (Case Box/Order Box)	140
Termină un caz necomandat în Case Box	140
Comunică folosind etichete	142
Aduagă etichete la crearea unui caz nou	142
Aduagă etichete la comandă	143
Verifică etichetele de pe Detaliile cazului	143

Introducere

Medit Link

Medit Link este un instrument de colaborare conceput pentru a facilita comunicarea între clinici și laboratoare pentru a oferi un flux de lucru optimizat pentru fiecare parte.

Oferă funcții diferențiate în funcție de tipul și permisiunile fiecărui cont. Programul oferă o interfață de utilizator ușor de utilizat pentru gestionarea fluxului de lucru, de la scanarea cu scanere orale și modele, comandarea cazurilor și proiectarea și producerea de proteze.

Medit Link este alcătuit dintr-un serviciu web și o aplicație de calculator.

Prezentare generală Servicii

		Web	Aplicație
		• Înregistrează-te și gestionează contul • Caută și gestionează parteneri • Partajează cazuri prin Web Viewer cu un link partajabil • Accesează cazurile realizate din aplicație • Gestionează comenzile	• Introdu informații formular • Scanează • Gestionează comenzile • Conectare cu CAD • Gestionează pacienți
Clinică	Administrator	Caută și gestionează partenerii și clinicile tale și partajează cazuri. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Introdu informații despre formulare, scanează, plasează comenzi și gestionează pacienții. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Membru	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Laborator	Administrator	Caută și gestionează partenerii și laboratorul tău și partajează cazuri. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Introdu informații în formular, scanează și gestionează comenzile. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Membru	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Serviciu cloud

Medit Link susține încărcarea/descărcare automată a bazelor de date și a fișierelor prin AWS (Amazon Web Services).

Datele stocate în cloud sunt sincronizate automat cu computerele mai multor utilizatori din organizație, astfel încât aceștia să poată accesa aceleași date de pe orice computer în orice moment. Backup-ul și recuperarea bazate pe cloud îți păstrează toate datele în siguranță. Îți păstrează datele în siguranță chiar și în cazul pierderii de date din cauza unei defecțiuni bruște a computerului.

Serviciul cloud permite stomatologilor și laboratoarelor partenere să partajeze rapid datele fără a mai fi nevoie să trimită e-mailuri sau să transfere manual scanările. Toate datele, inclusiv informațiile despre pacienți, sunt criptate, stocate și transmise în condiții de siguranță. Medit respectă legile și reglementările medicale, cum ar fi HIPAA și GDPR.

Platforma de gestionare a fluxurilor de lucru cu sistem de comandă

Medit Link oferă sistemul său de comandă.

- Medit Link permite utilizatorilor să stabilească parteneriate între stomatologi și laboratoare dentare și să facă schimb de date rapid și ușor.
- Poți verifica și gestiona starea comenzii.

Cerințe de sistem



Consultă cerințele de sistem pentru Medit Scan for Clinics și Medit Scan for Labs dacă dorești să folosești software-ul de scanare cu scannerul tău.

Cerințe sistem pentru Windows

	Laptop & Desktop
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz sau mai mare
RAM	16 GB sau mai mare
Grafice	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) sau mai mare / sau o placă video AMD echivalentă
OS	Windows 10 64 Bit (indisponibil în 32 Bit) sau mai mare

Cerințe sistem pentru macOS

	Mac
Procesor	M1 cu 8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine
RAM	16 GB sau mai mare
OS	Monterey 12 sau mai mare

Cerințe de sistem pentru serviciul web

Recomandat pentru browsere

	Browsere
Calculator	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox

Minimum pentru dispozitive mobile

	Android	iOS
Dispozitiv	Galaxy S7 echivalent sau mai mare	iPhone 7 echivalent sau mai mare
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB sau mai mare	2 GB sau mai mare
AP	Peste Snapdragon 710	A10 Fusion


Instalare pe Windows

Medit Link este instalat ca un pachet cu programele de achiziție de scanare - Medit Scan for Clinics și Medit Scan for Labs.


1. Lansează Medit_LinkSetup.exe.
2. Selectează o limbă pentru instalare.
3. Selectează folderul pentru a instala Medit Link. Citește și acceptă termenii și condițiile de licență și fă clic pe „INSTALEAZĂ”.



4. Asigură-te că cablul scannerului este deconectat de la computer înainte de a trece la pasul următor. Este posibil ca instalarea să nu continue dacă scannerul este conectat la PC.
5. Programul va fi instalat automat și poate dura câteva minute. Nu opri sau scoate din priză calculatorul până când instalarea nu este finalizată.

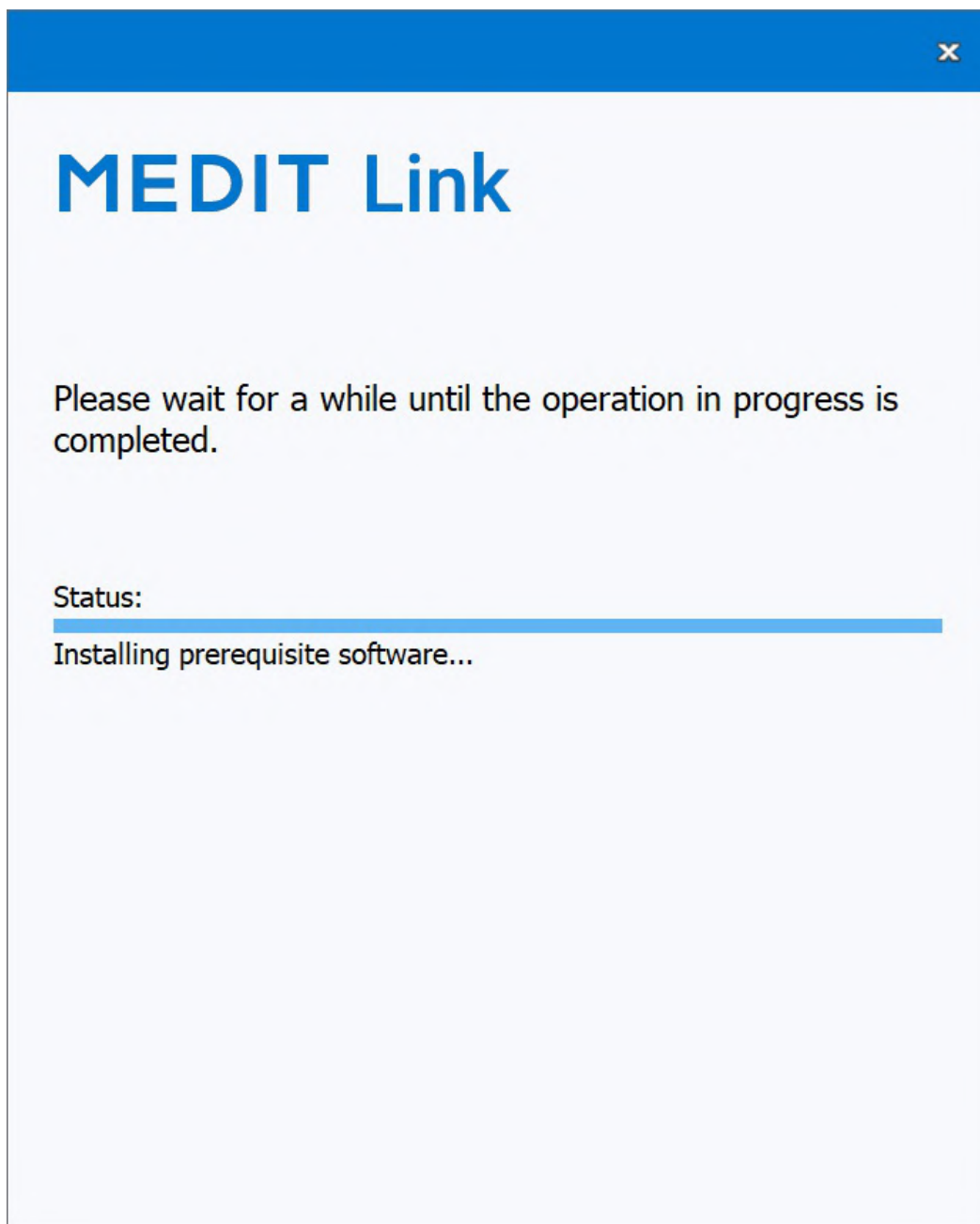

6. Te rugăm să repornești calculatorul după finalizarea instalării. Poți continua fără a reporni calculatorul dacă nu ai scannerul.

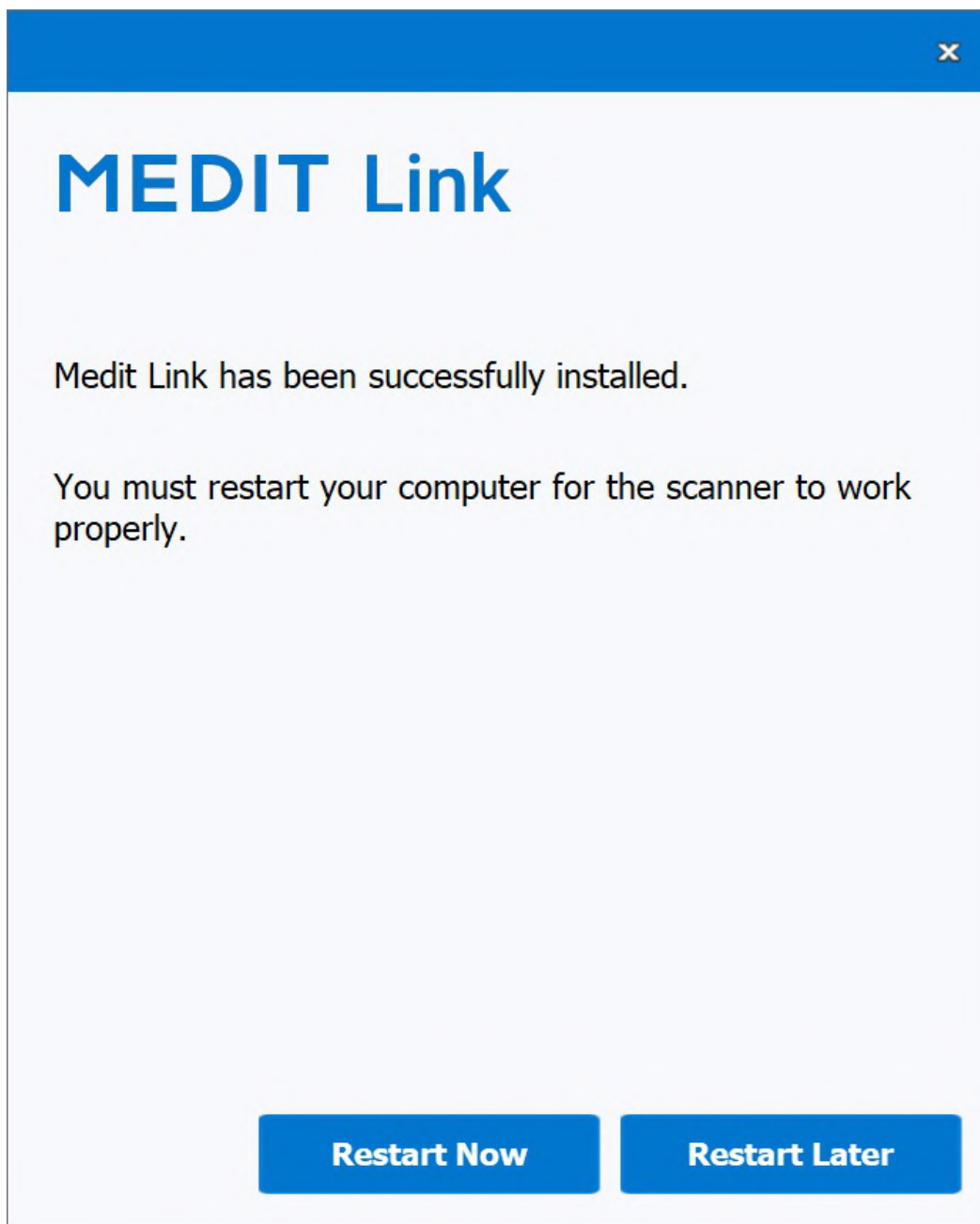


Dacă nu repornești calculatorul după finalizarea instalării, este posibil ca scanerul să nu funcționeze corect.


Instalare pe macOS

Medit Link este instalat ca un pachet cu Medit Scan for Clinics.


1. Rulează Medit_Link_x.x.x.pkg și clic pe „Continuă.”

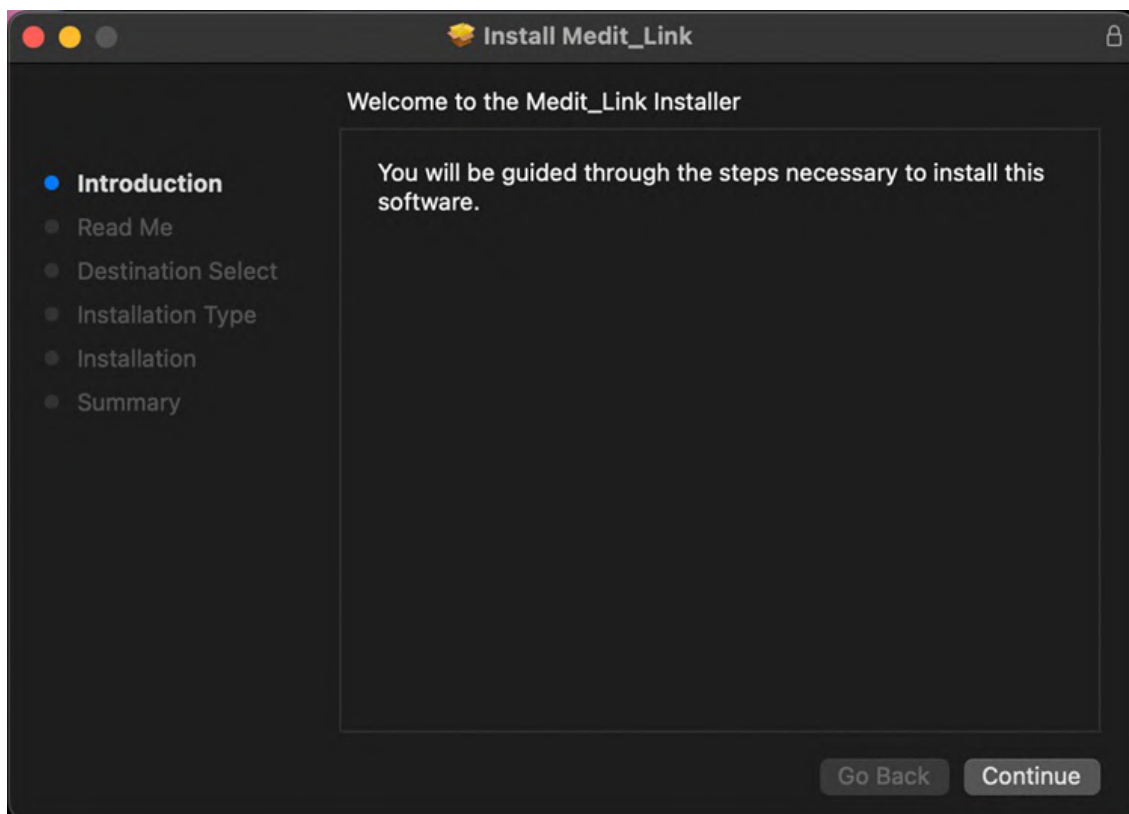


2. Citește Acordul de licență pentru utilizatorul final și fă clic pe „Continuă”.

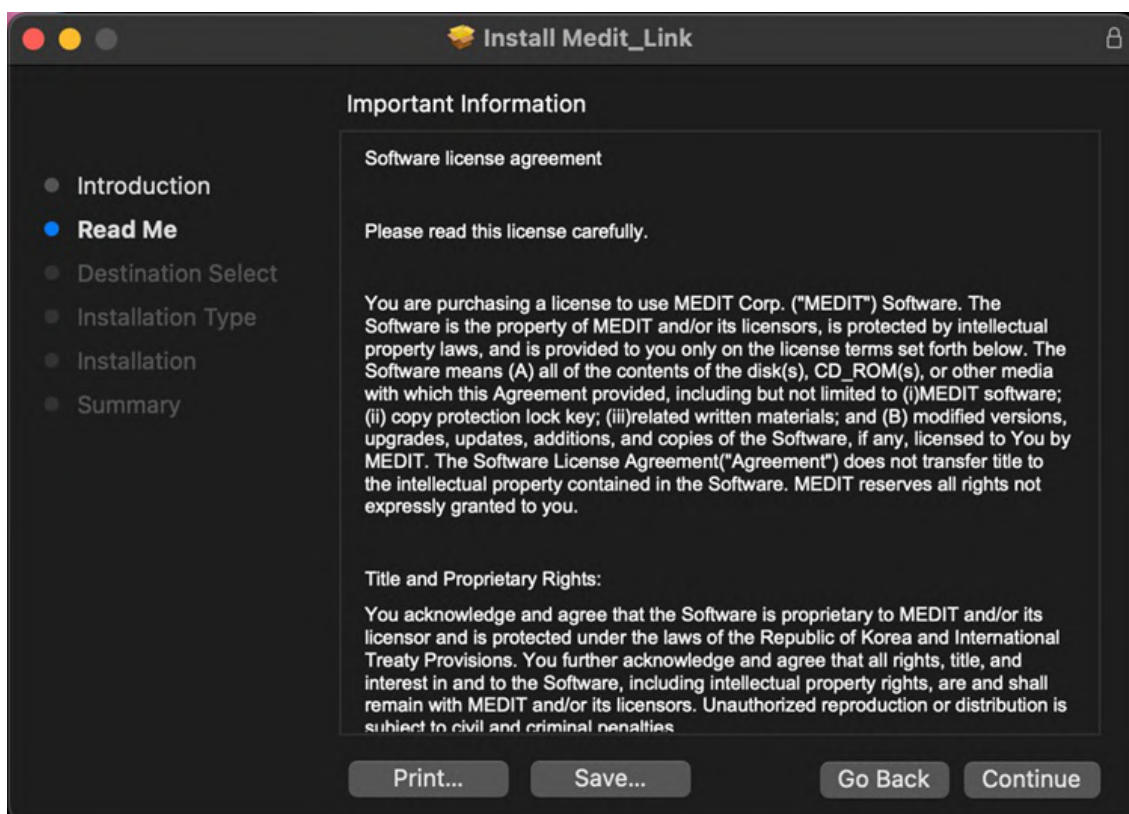

3. Selectează discul pentru a instala și fă clic pe „Continuă”.

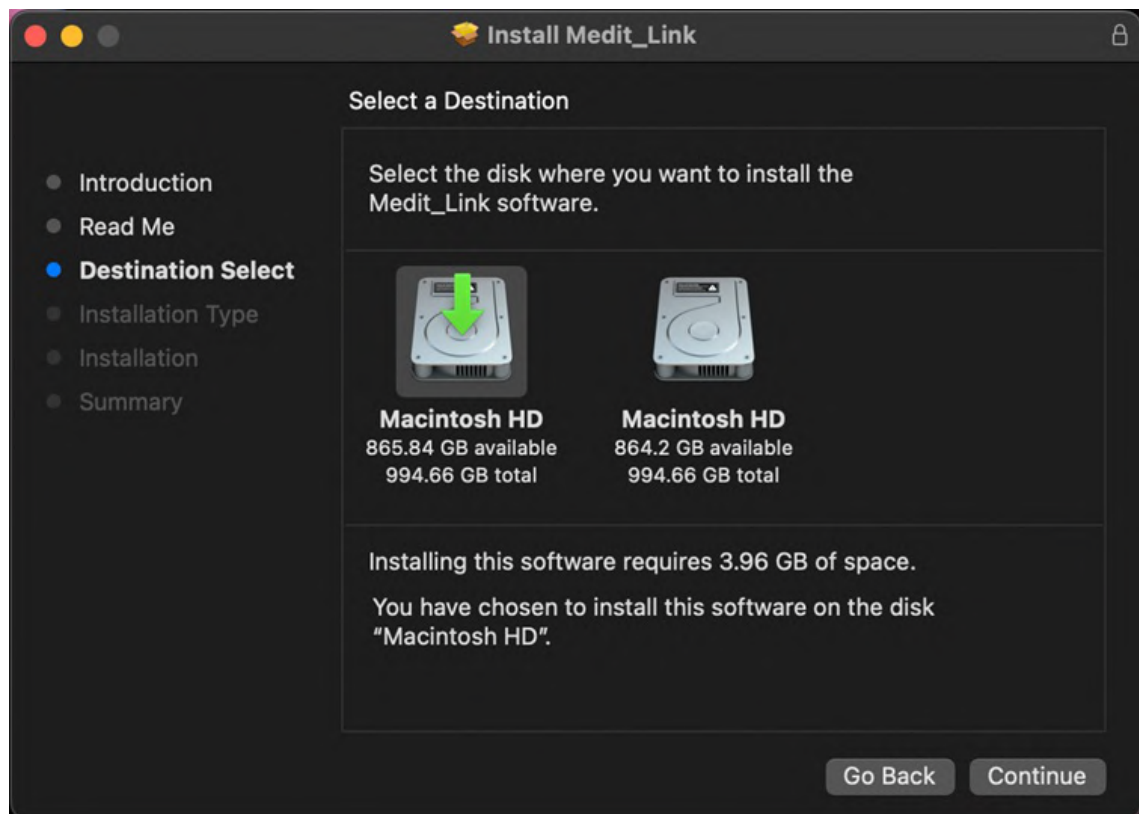


4. Clic pe „Schimbă locația de instalare...” pentru a schimba destinația de instalare.

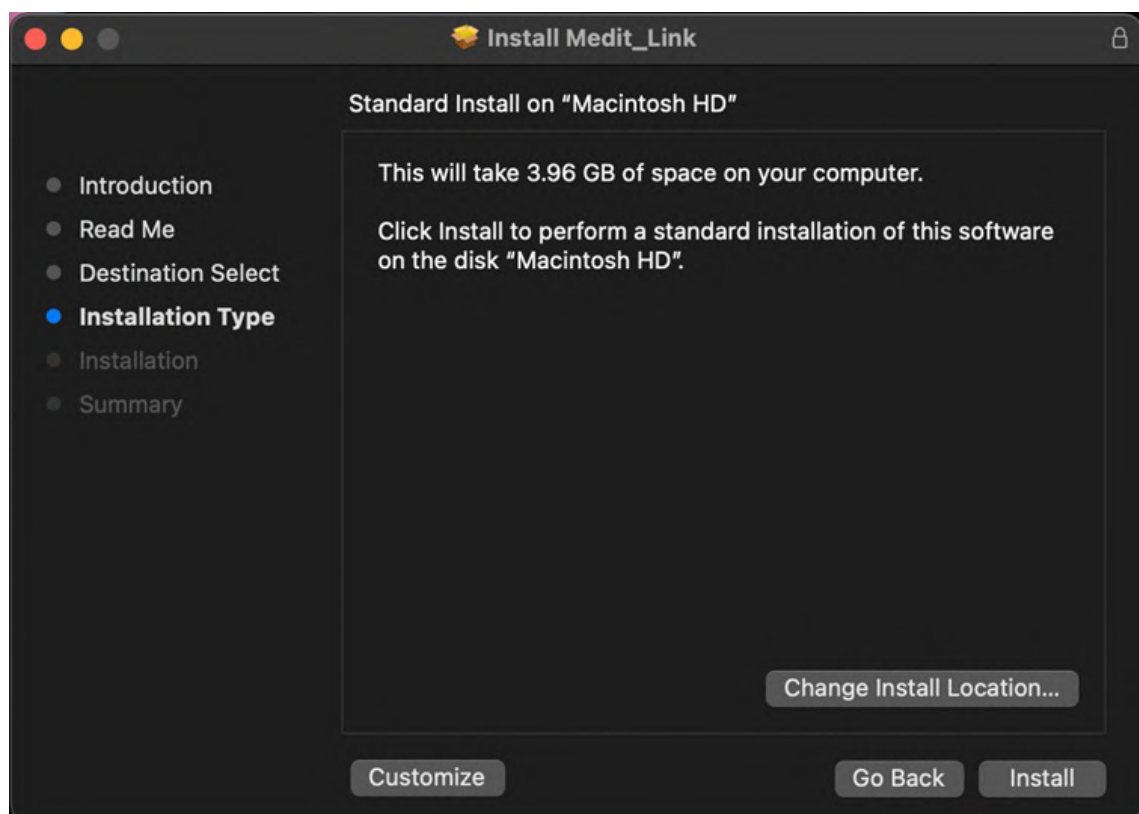


5. Clic pe „Instalează” și introdu parola Mac-ului tău pentru a permite instalarea dacă este solicitată.



6. Așteaptă până când instalarea este finalizată.

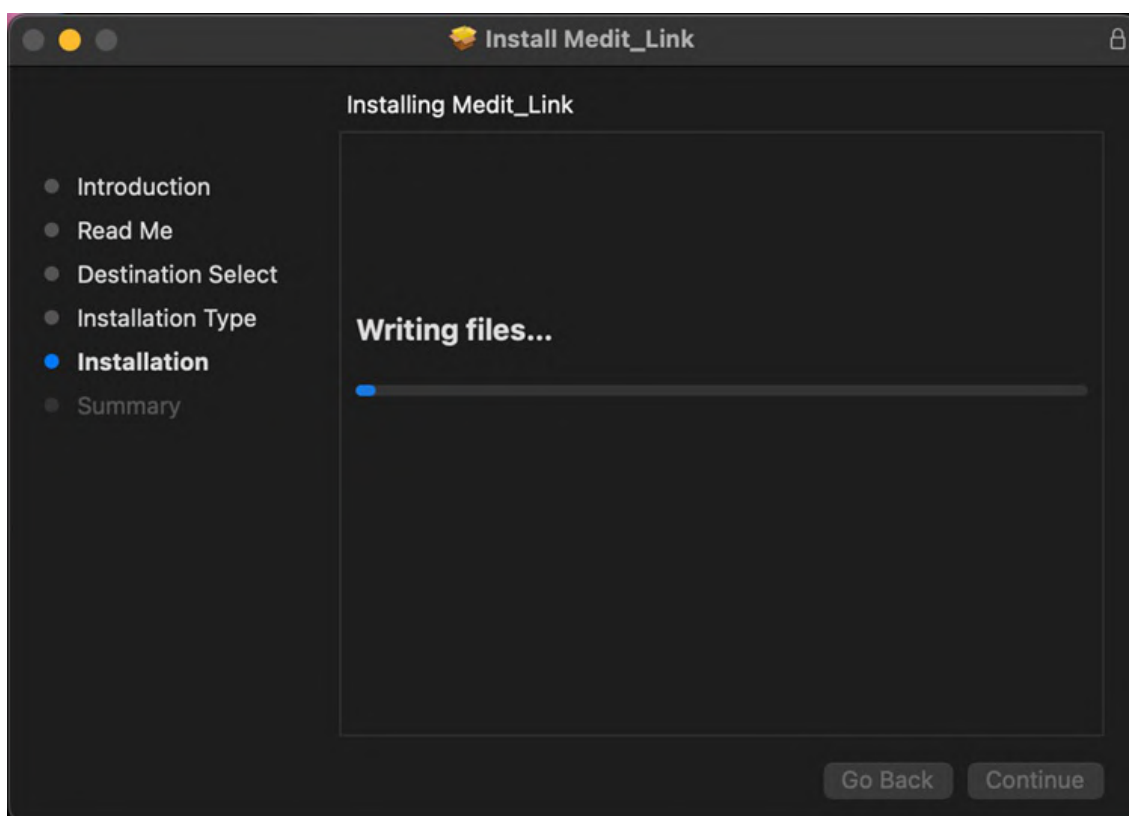


7. Clic „Închide” pentru a ieși din fereastra de instalare.

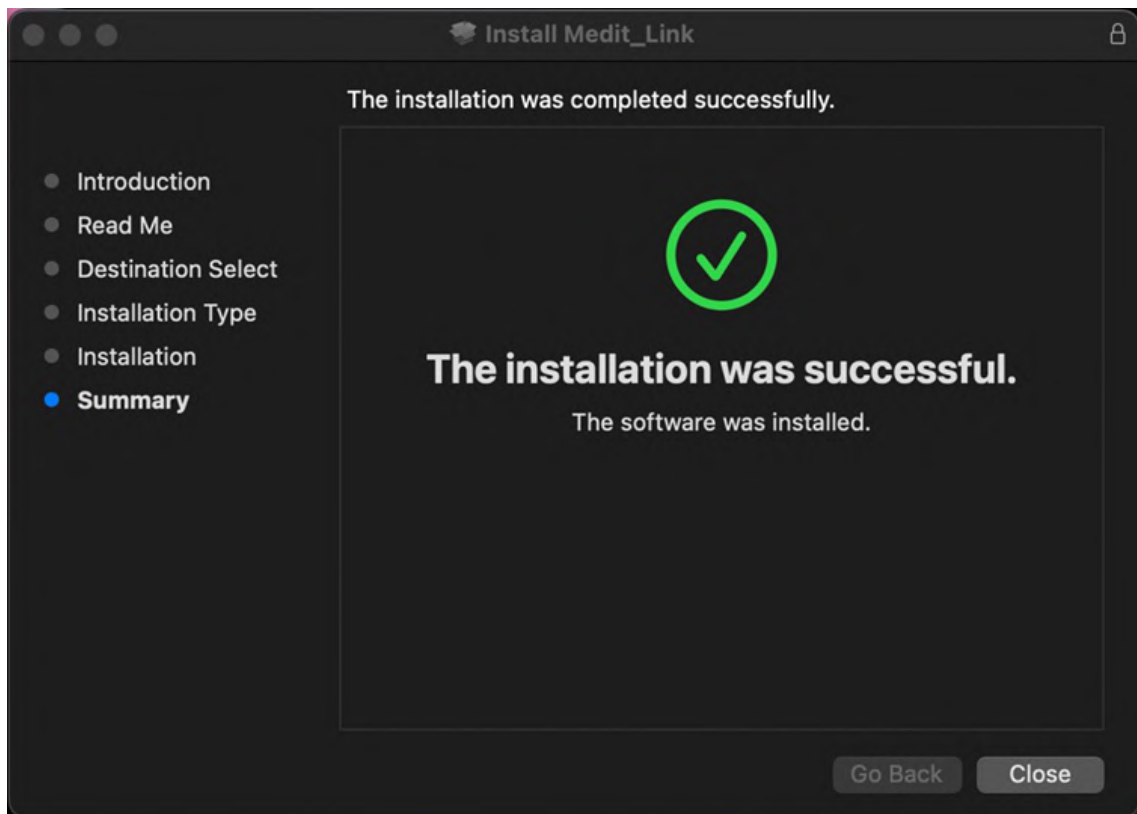

Înregistrare și conectare

Site web Medit Link

Înregistrează-te pentru serviciul Medit Link la www.meditlink.com.

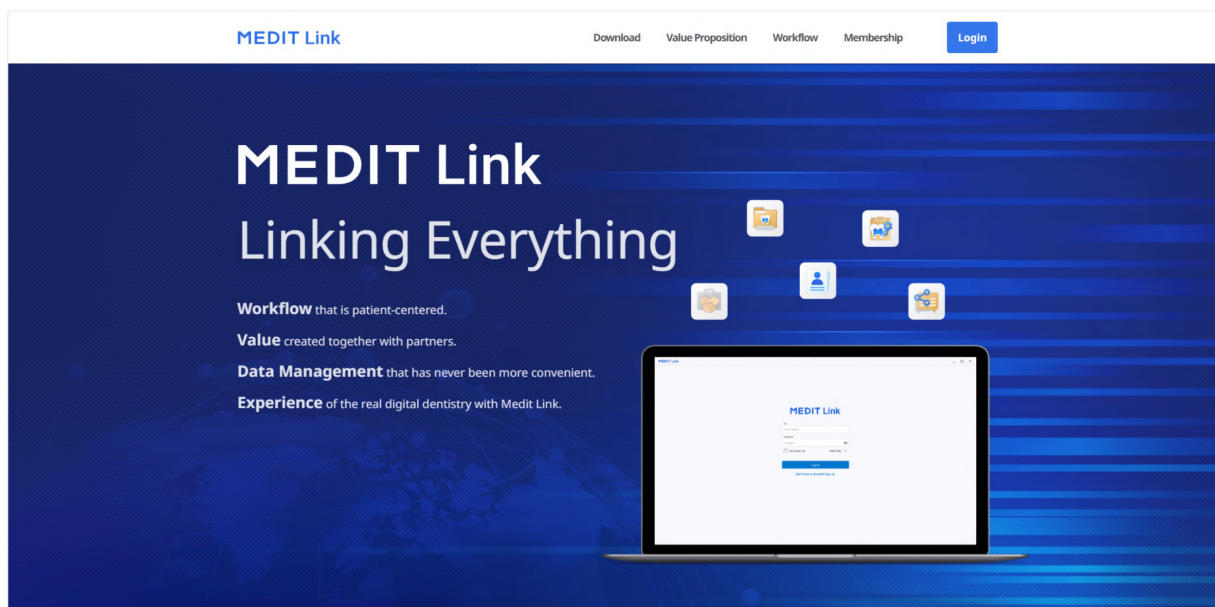

Înregistrează-te pentru Medit Link China la www.meditlink.cn.

Înregistrează-te

Pentru a utiliza serviciul Medit Link, trebuie să te înregistrezi pentru un cont. Poți utiliza funcțiile oferite de Medit Link după crearea unui cont ca clinică sau laborator.

Utilizatorii pot selecta unul dintre următoarele patru tipuri de cont pentru a se înregistra ca membru și pentru a utiliza serviciul cu caracteristici și privilegii complete sau limitate, în funcție de tipul de cont.

- Clinică - Administrator
- Clinică - Membru
- Laborator - Administrator
- Laborator - Membru

De obicei, administratorul este un reprezentant al organizației tale și va avea acces deplin la toate funcțiile și serviciile Medit Link. În schimb, contul de membru are acces limitat.

Pentru a te înscrie ca membru, urmează acești pași:

1. Faceți clic pe „Încă nu ai un cont? Înregistrează-te” pe pagina de autentificare.

MEDIT Link

ID

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? [Sign up.](#)



English (United States)



2. După ce ați citit descrierile furnizate, clic pe butonul „Înregistrează-te” pentru tipul de cont dorit.

Create Your Medit Link Account



Clinic


Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

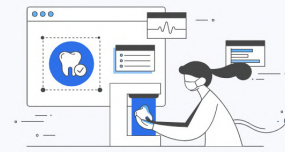

Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Va apărea următorul formulare de înregistrare.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

View

View

View

Back

Register

4. Introdu numele clinicii sau al laboratorului și apoi, în funcție de tipul de cont dorit, efectuează următoarele acțiuni:

- Dacă te înregistrezi în calitate de administrator, fă clic pe „Verifică disponibilitatea” pentru a vedea dacă numele introdus este disponibil.
- Dacă te înregistrezi ca membru, fă clic pe „Căutare”. Administratorul trebuie să înregistreze deja organizația înainte de a te înscrie.

5. Completează restul formularului de înregistrare și fă clic pe „Înregistrează-te”.



Dacă ești de acord să primești informații de marketing în timpul înregistrării, vei primi informații utile despre produsele și serviciile Medit.

6. Ți se va trimite un e-mail de verificare.

7. Pentru a finaliza procesul de înregistrare, verifică-ți adresa de e-mail cu ajutorul linkului primit.

Pagina de autentificare și de bun venit

1. Introdu adresa ta de e-mail și parola pe pagina de conectare și fă clic pe „Autentificare”.

MEDIT Link

ID

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.




English (United States)



2. Dacă nu ai completat informațiile afacerii tale, va apărea următoarea fereastră pop-up.

Welcome, stage-test-wh!

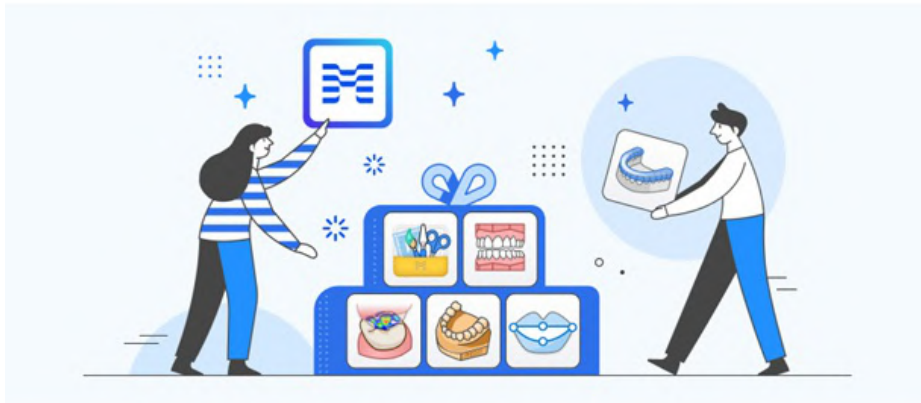

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)




Pentru a utiliza serviciile Medit Link, informațiile clinicii sau laboratorului tău trebuie să fie introduse utilizând contul de administrator.

3. Clic pe butonul „Mergi la Clinica mea” sau „Mergi la Laboratorul meu” și introdu informațiile despre clinică sau laborator, inclusiv numele afacerii, imaginile de copertă/logo, serviciile pe care le oferi, adresa și numărul biroului etc.
4. Informațiile introduse pe pagina de bun venit pot fi editate oricând în filele My Info > Clinica mea sau Laboratorul meu în Medit Link Web.

Dashboard

Prezentare generală Dashboard

Poți vizualiza statisticile pentru toată activitatea desfășurată pe Medit Link în grafice și diagrame vizualizate - atât în aplicația Medit Link App, cât și pe Web.

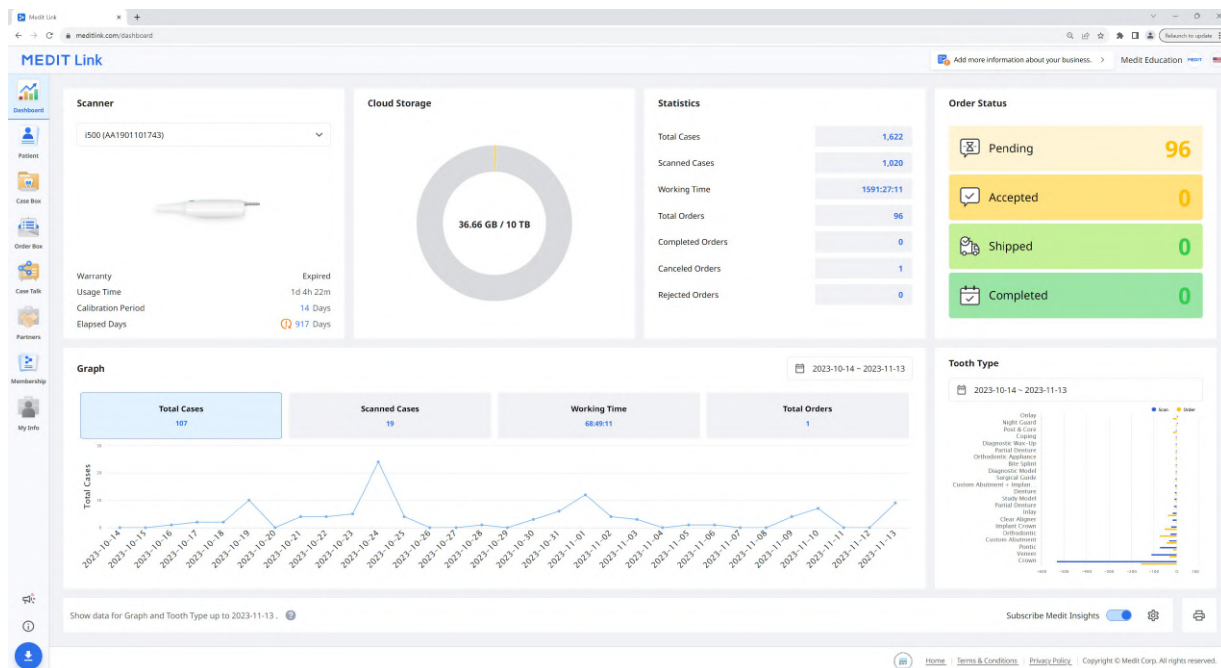

Graficele și diagramele din dashboard arată statisticile pentru toată activitatea desfășurată în Medit Link.

Scanner	Furnizează informații despre scanările active, inclusiv garanția, intervalul de calibrare și timpul scurs de calibrare.
Spațiu de stocare Cloud	Afișează capacitatea totală cloud și cantitatea utilizată.
Statistici	Furnizarea de statistici privind cazurile în funcție de statutul postului.
Statusul comenzii	Furnizează statistici privind cazurile în funcție de starea comenzilor.
Grafic	Reprezentarea grafică a informațiilor privind locurile de muncă pe perioade.
Tip dinte	Furnizează statistici privind numărul de scanări și comenzi în funcție de informațiile privind tratamentul.


Medit Insights

Medit Insights este un serviciu de raportare care te ajută să analizezi statisticile de utilizare.



Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- Medit Insights

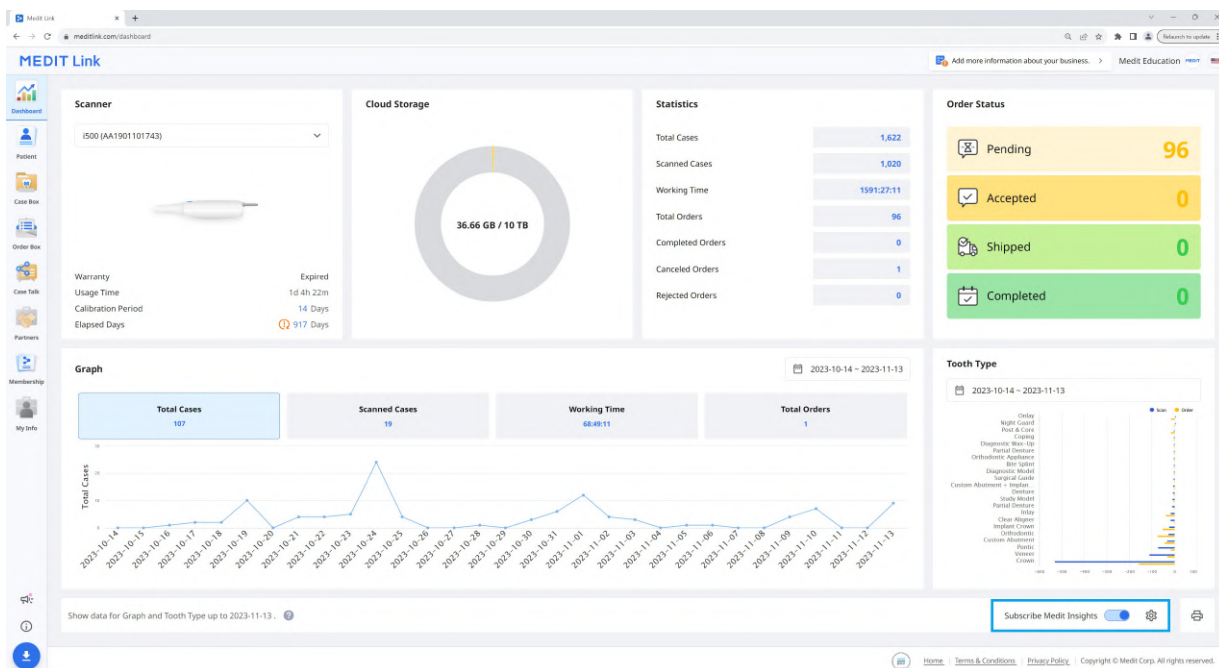

Abonează-te la Medit Insights

Poți primi un e-mail de raportare în a doua zi a fiecărei luni. Nu este necesar niciun alt proces de înscriere. Doar activează „Abonează-te la Medit Insights”.

Dacă nu utilizezi adresa de e-mail pe care ai folosit-o pentru contul Medit Link, poți seta o altă adresă de e-mail pentru a primi Medit Insights.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

În a doua zi a fiecărei luni, vei primi un e-mail cu statistici, așa cum se arată mai jos.

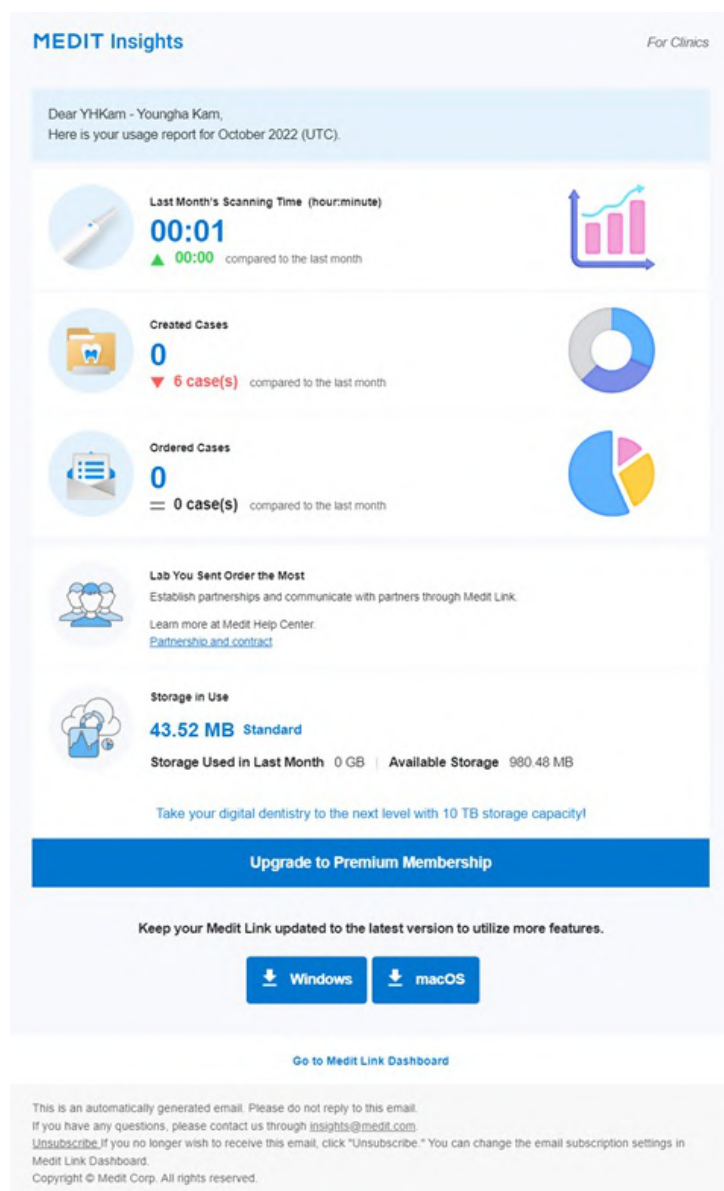

Banner	Medit oferă sfaturi și informații utile aici. * Dacă nu vrei să vezi bannerul, debifează căsuța de selectare a Acordului de marketing și promovare din Informațiile mele > Contul meu.
Informații statistice	Sunt afișate informații statistice, cum ar fi timpul de scanare, cazurile create, laboratorul cel mai comandat etc.
Descarcă Medit Link	Butonul oferă linkul de descărcare a Medit Link.
Dashboard	Toate informațiile statistice se bazează pe informațiile din Dashboard. Poți vedea mai multe detalii în Dashboard.


Dezabonare Medit Insights

Dezactivează „Abonare Medit Insights” în Dashboard sau clic „Dezabonare” în e-mailul primit.

Patient

Poți gestiona cazurile pe baza numelui și a ID-ului pacientului.


Toți pacienții înregistrați prin intermediul aplicației Medit Link sunt afișați într-o listă, ceea ce facilitează gestionarea pacienților și a cazurilor acestora.

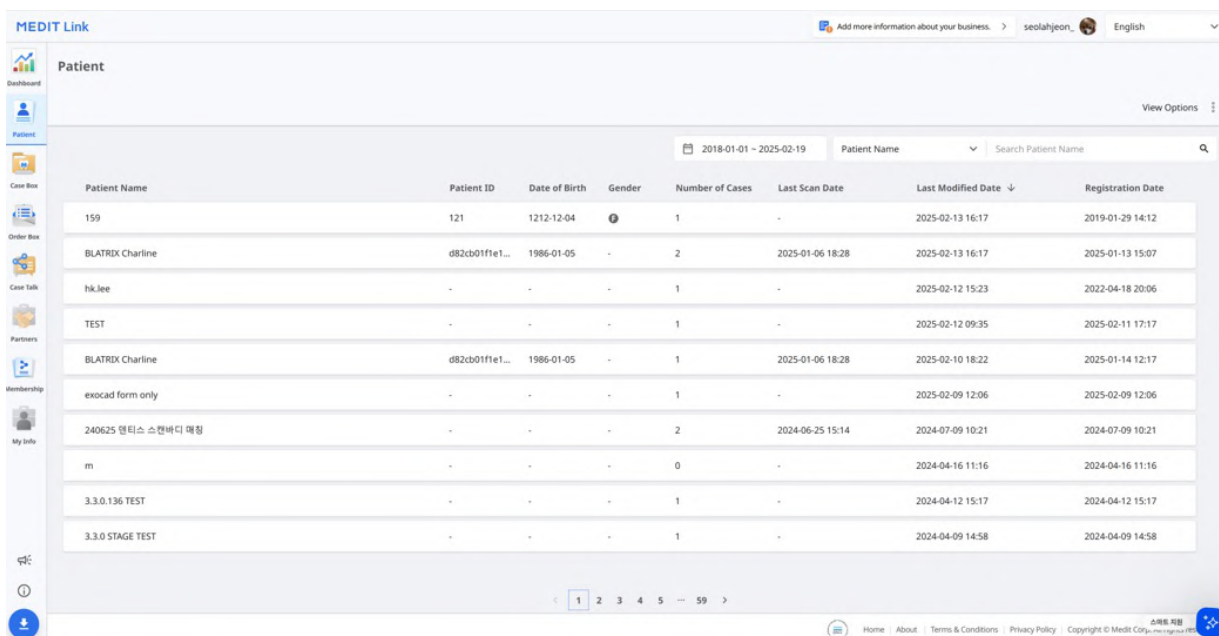

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
159	121	1212-12-04		1	-	2025-02-13 16:17	2019-01-29 14:12
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	2	2025-01-06 18:28	2025-02-13 16:17	2025-01-13 15:07
hik.lee	-	-	-	1	-	2025-02-12 15:23	2022-04-18 20:06
TEST	-	-	-	1	-	2025-02-12 09:35	2025-02-11 17:17
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	1	2025-01-06 18:28	2025-02-10 18:22	2025-01-14 12:17
exocad form only	-	-	-	1	-	2025-02-09 12:06	2025-02-09 12:06
240625 덴티스 스캔배디 매칭	-	-	-	2	2024-06-25 15:14	2024-07-09 10:21	2024-07-09 10:21
m	-	-	-	0	-	2024-04-16 11:16	2024-04-16 11:16
3.3.0.136 TEST	-	-	-	1	-	2024-04-12 15:17	2024-04-12 15:17
3.3.0 STAGE TEST	-	-	-	1	-	2024-04-09 14:58	2024-04-09 14:58

Caută pacient

1. Selectează criteriile de căutare între Numele pacientului sau ID-ul pacientului din meniul derulant din dreapta sus a listei de pacienți.

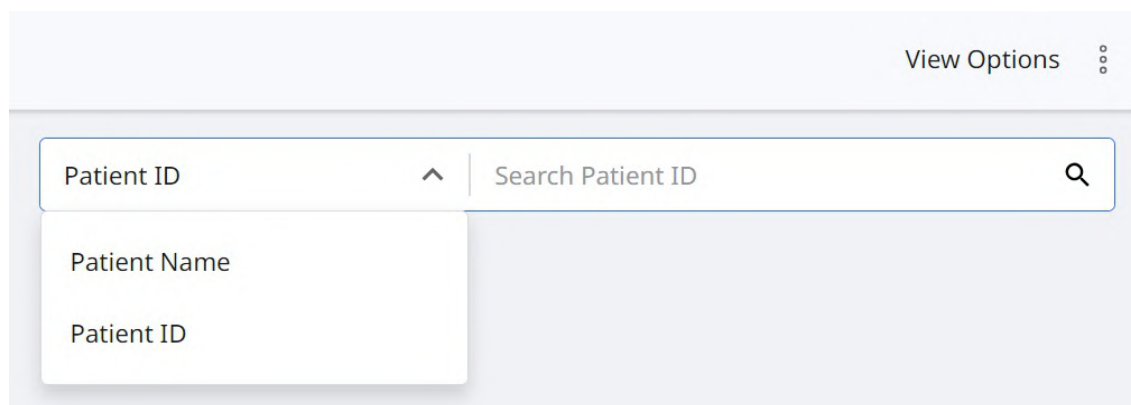

View Options

Patient ID ^ Search Patient ID

Patient Name

Patient ID

2. Introdu numele pacientului sau ID-ul pacientului pentru a căuta în funcție de criteriile de căutare selectate.
3. În listă sunt afișați numai pacienții cu numele sau ID-ul de pacient introdus.

Case Box/Work Box

Case Box (Clinică) sau Work Box (Laborator) afișează toate cazurile pe care utilizatorul le-a creat în aplicația Medit Link. Poți vizualiza fișierele prin intermediul unui browser web fără a instala un program separat.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a search bar with 'Patient' selected. Below it, a row of filter buttons includes 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The main area displays a table of cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table lists several cases, some with 'Share' buttons. A sidebar on the left contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2

Filtrare caz

Filtrează după pacient

Poți filtra cazurile după pacienți. Este util când găsești cazuri pentru anumiți pacienți.

This screenshot shows the top part of the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' label is next to a dropdown menu currently showing 'Patient'. Below this, a row of filter buttons is visible: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The 'All' button is highlighted with a checkmark.

1. Introdu numele pacientului în câmpul de căutare.

Patient

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. Selectează un pacient din lista de rezultate de căutare.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -+ 2 ^

testⓧ

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

Selected Patients


[Clear Selection](#)

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -


☒ test / - / - / -

3. În listă sunt afișate numai cazurile pacienților selectați, ceea ce facilitează găsirea cazurilor cu care dorești să lucrezi.

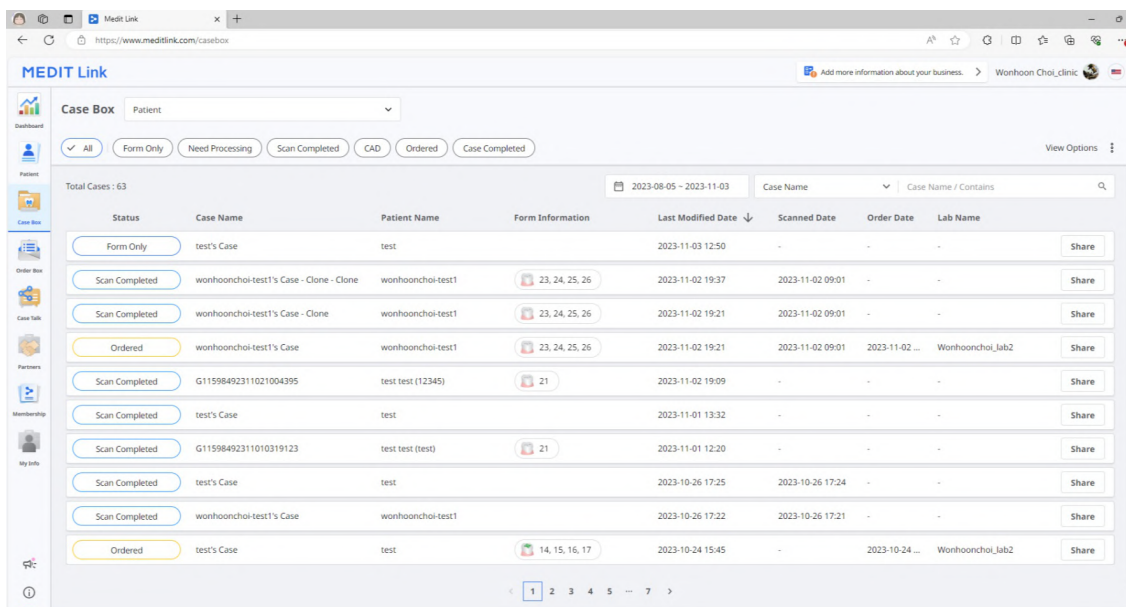

Filtreză după statut

Poți filtra cazurile în funcție de statutul acestora.

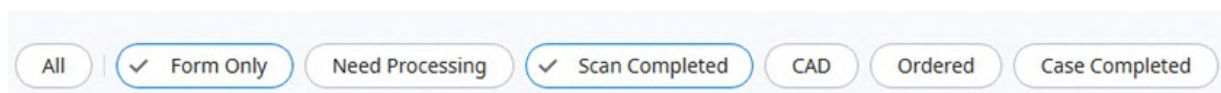

- Utilizatorul poate face clic pe starea pe care dorește să o vizualizeze. Browserul va afișa numai cazurile cu starea aleasă.
- Utilizatorul poate selecta mai multe statusuri simultan.

În funcție de tipul de cont, se oferă următoarele tipuri de stare:

Case Box (Clinică)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Laborator)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done


Filtrare după durată

Poți filtra și afișa cazurile care au fost modificate ultima dată în perioada stabilită.

1. Clic pe filtrul de durată.



2. Selectează intervalul.

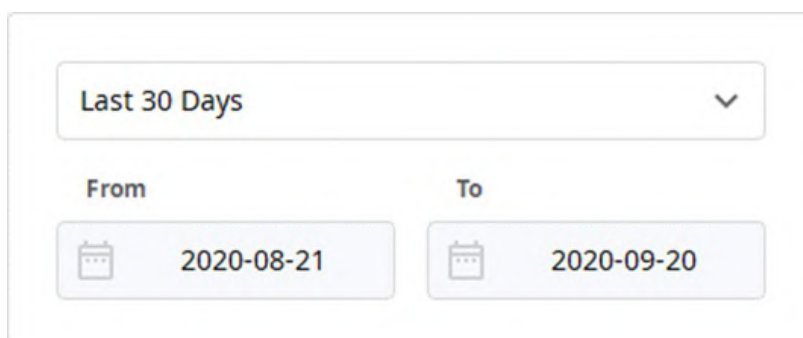

- Toate: Afișează toate cazurile.
- Interval personalizat: Specifică datele de început și de sfârșit pentru a afișa cazurile modificate în perioada respectivă.
- Astăzi: Afișează ultimele cazuri modificate astăzi.
- Ieri: Afișează cazurile modificate ultima dată cu data de ieri.
- Ultimele 7 zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 7 zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Ultimele 30 zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 30 zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Ultimele 90 zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 90 zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Luna aceasta: Afișează cazurile din această lună.
- Luna trecută: Afișează cazurile din luna precedentă.

Lista de cazuri va fi actualizată în timp real cu cazurile create sau modificate ultima dată în intervalul de timp selectat.

Filtrare după căutare

Poți utiliza capacitățile de căutare pentru a căuta informațiile necesare cu ușurință și rapiditate.

Case Name ▾


Case Name / Contains

🔍

Următoarele opțiuni de căutare sunt oferite în funcție de tipul de cont:

Case Box (Clinică)	Nume caz, Nume pacient, ID pacient, Nume laborator
Work Box (Laborator)	Nume caz, Nume pacient, Nume clinică, ID comandă

Detalii caz

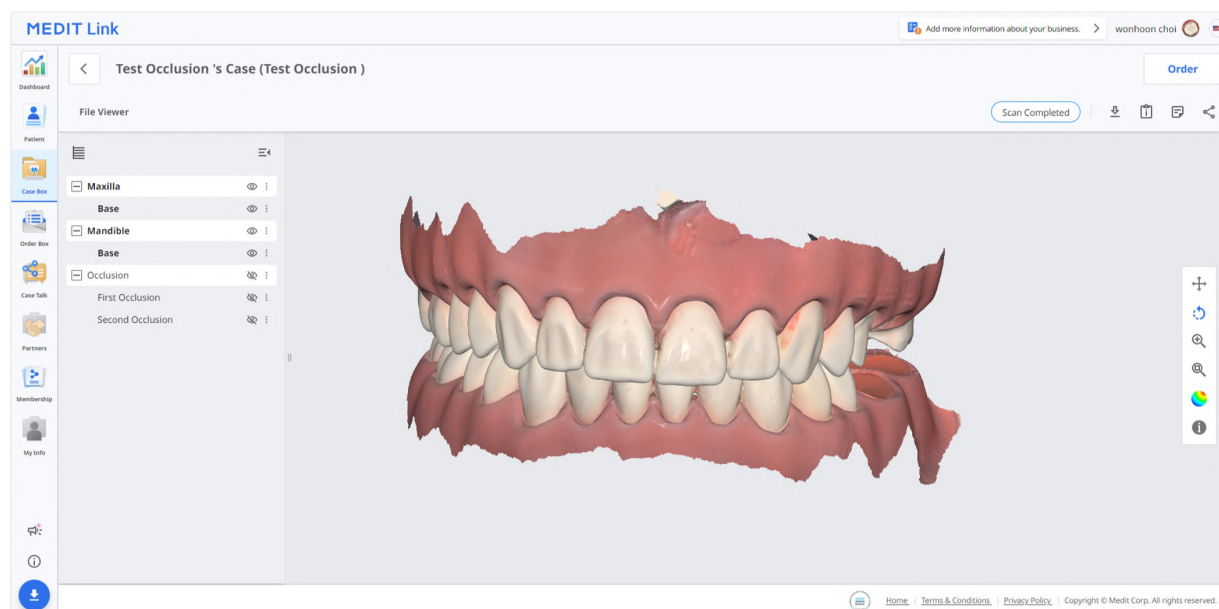

Următoarele instrumente de gestionare a cazurilor sunt furnizate în Case Box/Work Box.

	Status caz	Afișează statutul cazului.
	Mergi la Order Box/In Box	Furnizează o comandă rapidă pentru același caz într-o altă casetă (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Descarcă	Descarcă fișierele din caz pe calculatorul local.
	Informații caz	Revizuieste detaliile cazului și salvează-le în format PDF sau tipărește-le.
	Memo și etichete	Adaugă o notă sau etichete atunci când înregistrezi sau comanzi un caz. Folosește-le pentru a comunica partenerilor tăi orice informații suplimentare despre caz.
	Partajează	Creează un link pentru partajare. Utilizatorii cu linkul partajat pot accesa datele 3D într-un browser, cum ar fi Chrome, Firefox sau Safari, fără a instala programe suplimentare.

Order Box/In Box

Order Box (Clinică) sau In Box (Laborator) afișează cazuri comandate pe aplicația Medit Link.

Detalii comandă

- | | |
|---|---|
| 1 | Afișează numele cazului și numele pacientului. |
| 2 | Asigurarea funcțiilor de gestionare a comenzilor (acceptare/anulare; livrare/recepție). |
| 3 | Afișează filele disponibile: Comandă, Vizualizare fișier |
| 4 | Afișează funcții pentru gestionarea cazurilor și a fișierelor: starea cazului, comenzi rapide pentru informații detaliate, informații despre caz, memo & etichete etc. |
| 5 | Afișează informații detaliate pentru comandă, inclusiv numărul comenzii, numele pacientului, numele partenerului, data scanării, data comenzii, data livrării și memo & etichete. |
| 6 | Afișează informațiile despre produsul comandat și starea livrării. |


File în Order Box/In Box

Comandă	Vizualizare fișier
Verifică informațiile detaliate ale comenzii, cum ar fi ID-ul comenzii, numele pacientului, numele contului, data scanării, data comenzii, data livrării, memo și etichete.	Vizualizează fișierele generate de operațiunile de scanare/CAD. Vizualizatorul de fișiere afișează și gestionează modelele 3D și imaginile 2D obținute sau atașate.

Case Talk

Cazurile create în Medit Link pot fi partajate cu anumite persoane pe care le specifici, cu orice persoană care are un link partajat sau cu membrii înregistrați în Medit Link.

Utilizatorul poate vedea o listă a tuturor cazurilor partajate prin „Case Talk” în Medit Link App și Medit Link Web.

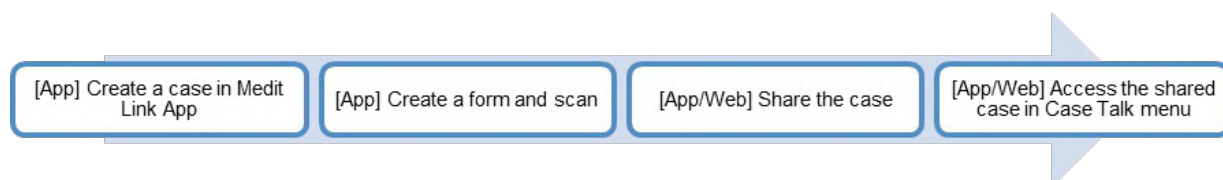


Cazurile partajate pot fi vizualizate prin intermediul unui browser web fără a instala un program separat, permițând o comunicare ușoară prin intermediul datelor 3D pe diferite dispozitive.


Crearea unui Case Talk

Poți crea o legătură partajată către un caz care a fost creat în Case Box/Work Box.

1. Găsește un caz pe care dorești să îl partajezi și fă clic pe butonul „Partajează” din dreapta.

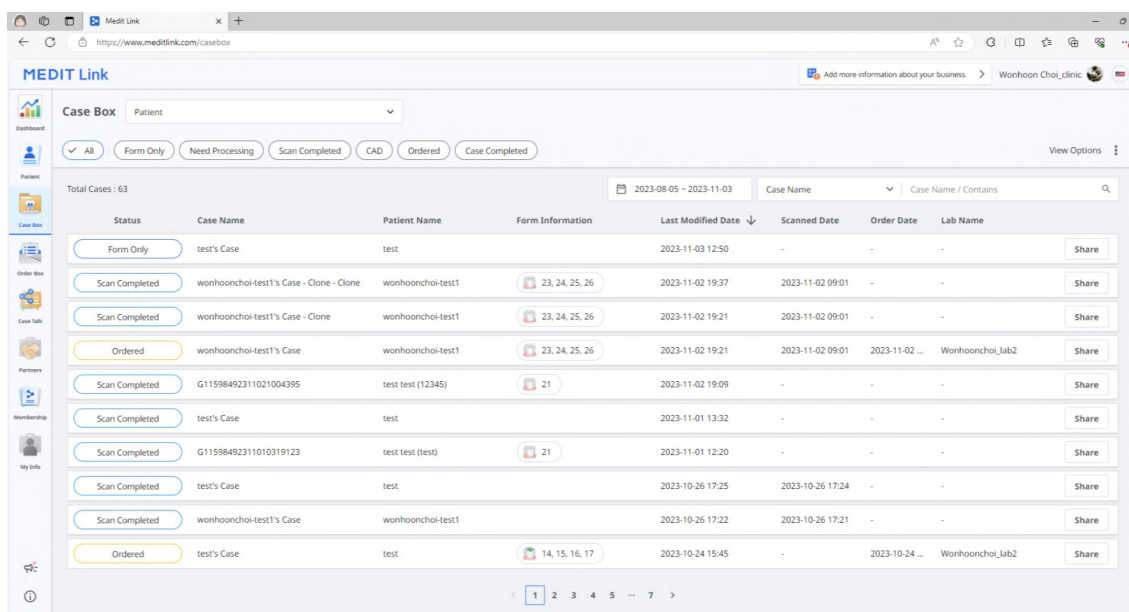

2. Selectează fișierele pe care dorești să le partajezi.

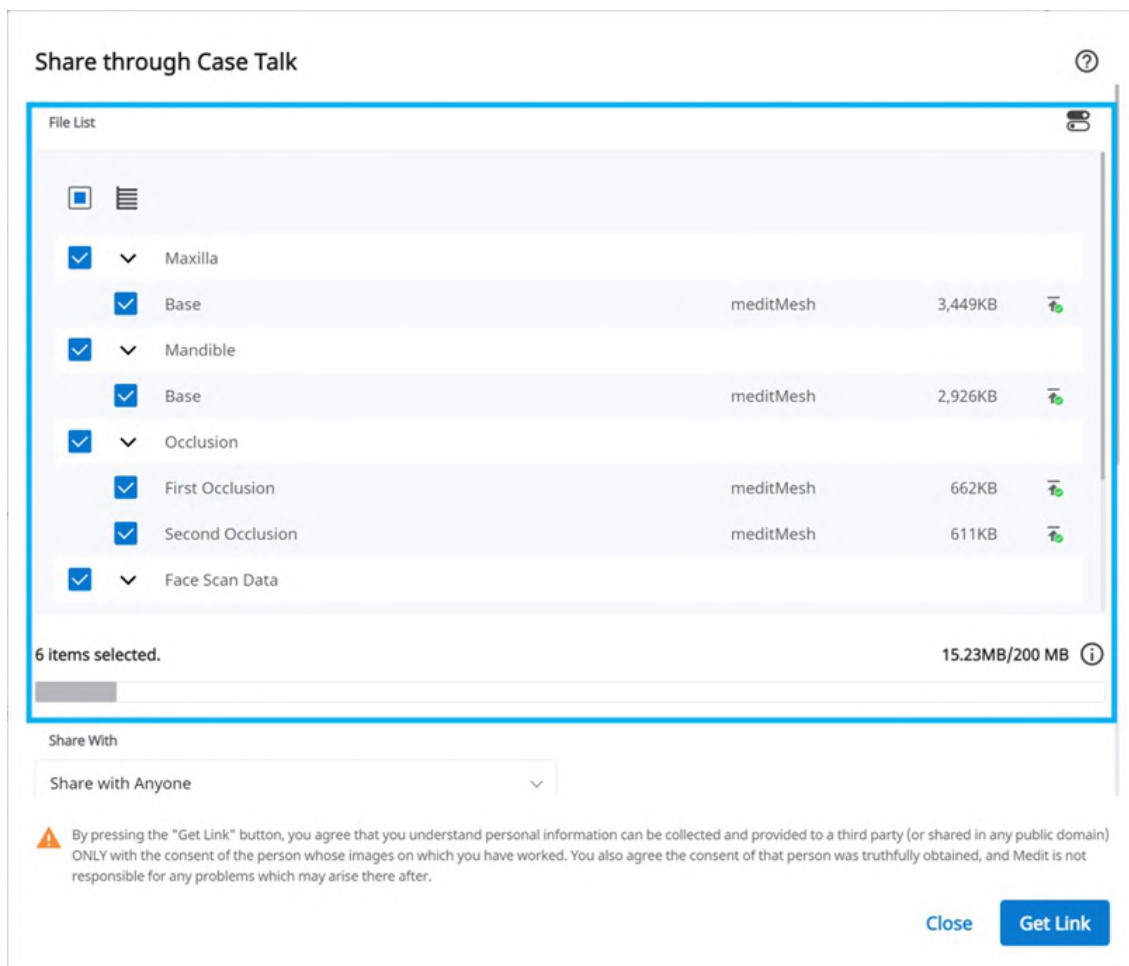

3. Setează tipul de permisiune de partajare și opțiunile de partajare.
4. Clic „Obține link” pentru a crea un link partajabil.

Setarea tipului de permisiune de partajare și a opțiunilor de partajare


②

Close Get Link

Partajează cu	• Partajează cu oricine Creează o legătură partajată. Poți partaja fișierele cu oricine. • Partajare cu anumite persoane Creează și trimite un link partajat către anumite persoane.
Partajează prin	Dacă selectezi „Partajează cu anumite persoane”, poți partaja linkul cu anumite persoane în diferite moduri. • Adresă de e-mail • SMS • Partners
Data de expirare	Setează data de expirare a linkului. După ce link-ul expiră, persoanele cu care l-ai partajat nu vor mai avea acces la fișiere. Poți prelungi perioada de expirare până la 90 de zile începând de astăzi.
Cod PIN	Setează un cod de acces din 6 cifre pentru a asigura securitatea datelor.
Partajează numele pacientului	Dacă bifezi această opțiune, toate persoanele care au acces la legătură vor vedea numele pacientului.
Acordare permisiune de descărcare	Dacă bifezi această opțiune, toți utilizatorii cu linkul pot descărca fișierele.
Permite comentarii	• Dacă bifezi această opțiune vei putea să comunici prin intermediul link-ului partajat. • Dacă debifezi această opțiune, destinatarul poate doar să vadă comentariile tale, dar nu va putea să le adauge pe ale sale.
Comentariu	Poți lăsa un mesaj în secțiunea de comentarii.

Detalii Case Talk

Poți vedea fișierele în cazul partajat. Următoarele funcții sunt disponibile pe pagina de detalii Case Talk.

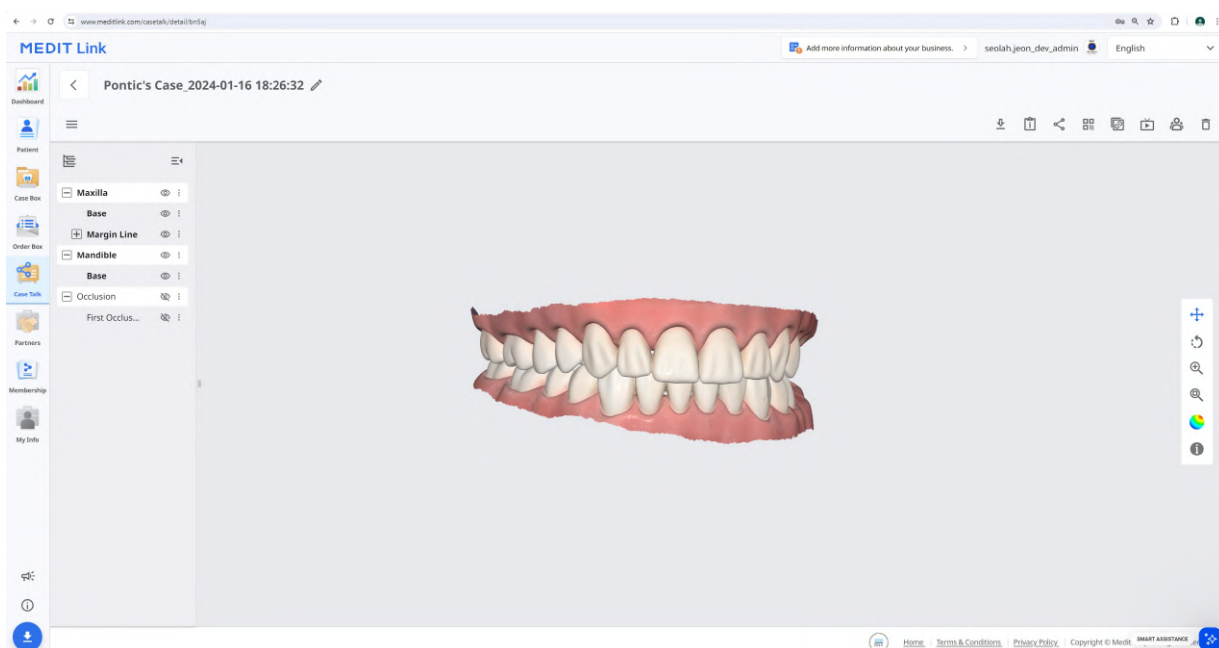

	Descarcă	Descărcați toate fișierele din dosar pe calculatorul local.
	Informații caz	Afișează informații detaliate despre caz.
	Partajează	Modifică setările de partajare.
	Cod QR	Partajează cazul cu un cod QR.
	Copiază link	Copiază linkul partajat în clipboard. Linkul copiat afișează fișierele partajate în browserul tău web.
	Live	Partajează ecranul cu utilizatorii conectați. Partajarea ecranului este sincronizată cu utilizatorii conectați.
	Participanți	Afișează toți utilizatorii care accesează linkul partajat.
	Șterge	Șterge linkul partajat. Linkul partajat șters nu mai este accesibil.

Aviz


Următoarele servicii nu sunt disponibile pe Medit Link China.

- Live
- Participanți

Web Viewer

Poți vizualiza datele partajate prin Case Talk într-un browser web.

Este posibil să se comunice cu persoanele care au acces la legătură folosind adnotări și comentarii.

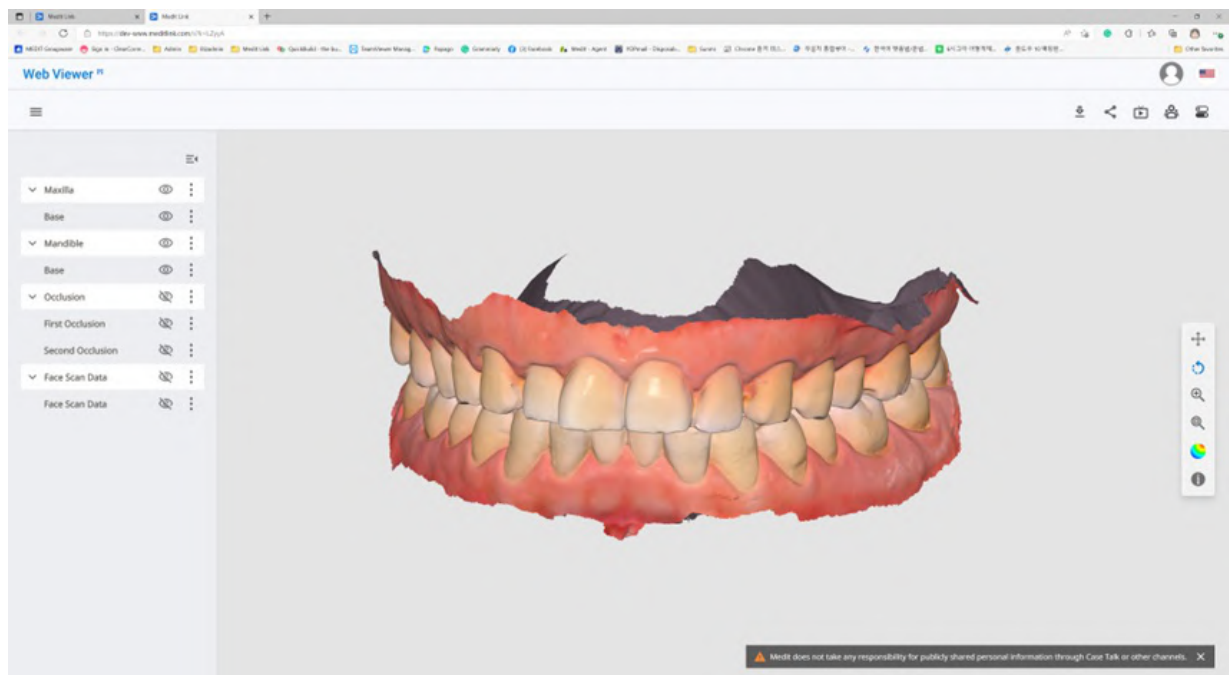

	Descarcă	Descarcă toate fișierele din acest caz în calculator.
	Informații caz	Afișează informații detaliate despre caz.
	Partajează	Modifică setările de partajare.
	Cod QR	Partajează cazul cu un cod QR.
	Live	Partajează ecranul cu utilizatorii conectați. Partajarea ecranului este sincronizată cu utilizatorii conectați.
	Participanți	Afișează toți utilizatorii care sunt conectați la legătura partajată.
	Etichetare dinte	Schimbă sistemul de etichetare a dinților.


Aviz

Următoarele servicii nu sunt disponibile pe Medit Link China.

- Live
- Participanți

Adnotare

Poți adăuga adnotări la o locație specificată pe modelul 3D. Oricine are acces la acest link poate vizualiza adnotările pe care le adaugi.

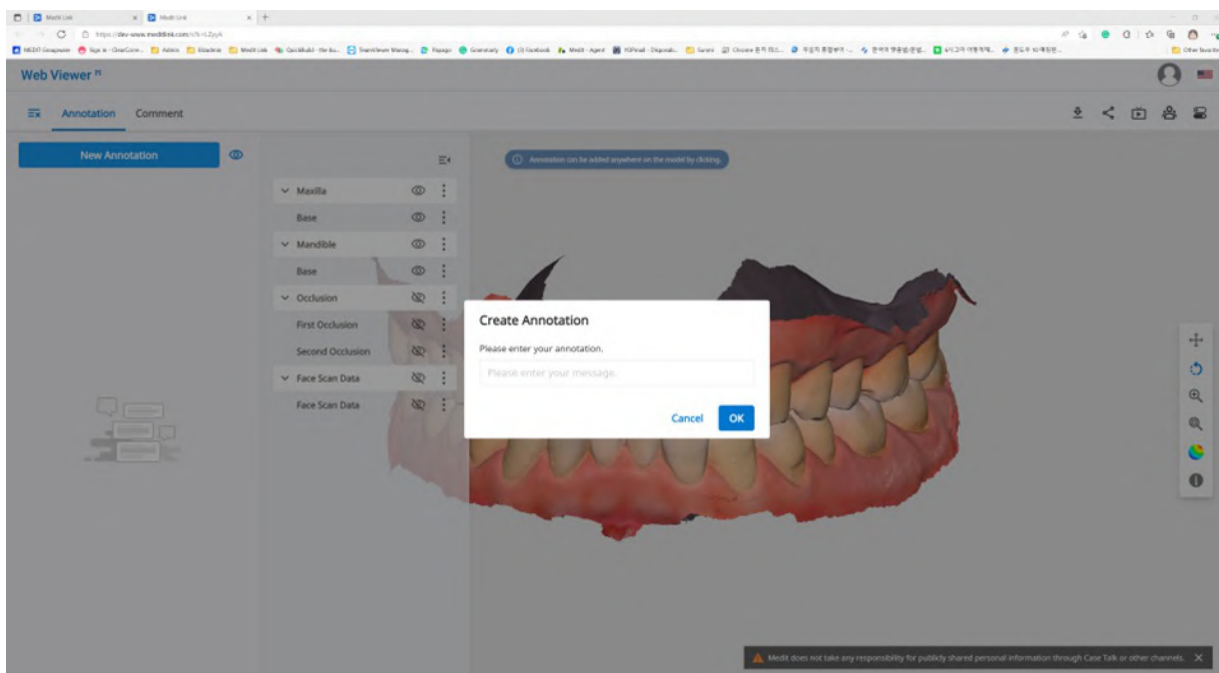


Aviz


Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- Adnotare

1. Găsește pictograma de meniu din colțul din stânga sus și selectează fila „Adnotare”. Utilizează butonul „Adnotare nouă” pentru a adăuga o adnotare oriunde pe date cu un singur clic.
2. Introduceți mesajul, apoi clic pe „OK” pentru a-l salva.

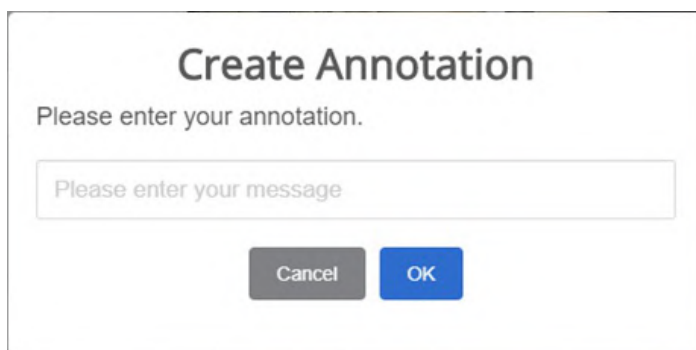A screenshot of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title 'Create Annotation' and a prompt 'Please enter your annotation.' Below this is a text input field with the placeholder 'Please enter your message'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. Poți folosi adnotările ca un simplu canal de comunicare.
Apasă pe adnotarea creată pentru a introduce un răspuns și apasă „Trimite”.

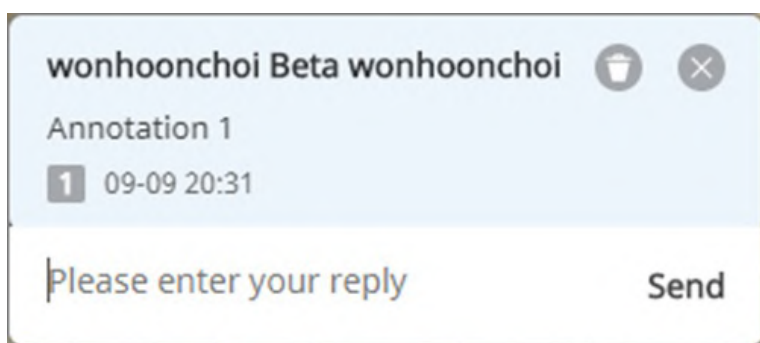A screenshot of the annotation chat interface. It shows a header with the name 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' and icons for deleting and closing. Below is a message card titled 'Annotation 1' with a timestamp '1 09-09 20:31'. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

Comentarii

Poți comunica cu utilizatorii care au acces la link prin intermediul filei „Comentariu” din meniul Web Viewer.

Aviz

Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- Comentariu

Partajarea ecranului în timp real

Poți partaja ecranul în timp real.

Aviz

Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- Live

1. Clic pe „Live” pentru a partaja ecranul Web Viewer cu utilizatorii conectați.




2. Clic pe „OK” pentru a începe partajarea ecranului.
3. Celelalte persoane care au accesat linkul trebuie să accepte partajarea ecranului.
4. Ecranul utilizatorului care a inițiat partajarea ecranului este afișat în sincronizare cu cel al persoanei care a primit cererea.


Arbore de date

Toate datele sunt grupate și afișate în funcție de atributele din arborele de date. Poți afișa sau ascunde datele, ajusta opacitatea și așa mai departe.

Controale arbore de date

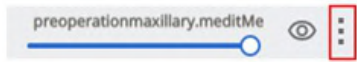Afișează / Ascunde	Clic pe pictograma „ochi” pentru a afișa sau ascunde datele din vizualizare. Controlează vizibilitatea datelor ca grup sau ca fișier individual.
Opacitate	Treci mouse-ul peste un element vizibil pentru a vedea bara glisantă de opacitate. Reglează bara glisantă pentru a modifica transparența datelor tale. 
Meniu extins	Meniul extins se află în partea dreaptă a fiecărui element al Arborelui de date. Include următoarele opțiuni:  • Arată doar asta: Ascunde toate celelalte date, cu excepția celor curente. • Ascunde: Ascunde datele actuale.

Controalele modelului 3D

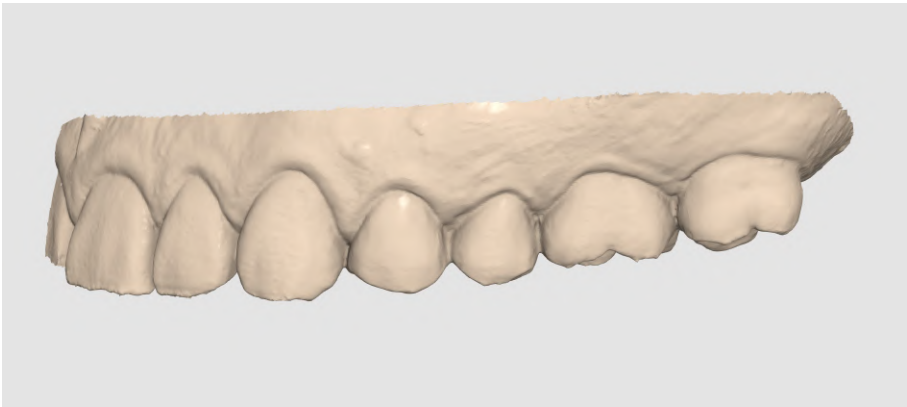+	Panoramic	Mută modelul.
○	Rotește	Rotește modelul.
%	Mărește/Micșorează	Mărește sau micșorează imaginea modelului.
🔍	Zoom ajustat	Poziționează modelul în centrul ecranului.
•	Mod de afișare a datelor	Afișează datele în culori cu finisaj mat (randare Phong). 
•	Mod de afișare a datelor	Afișează datele într-o culoare. 

Partners

Poți să cauți parteneri potențiali pentru a solicita un parteneriat și să vizualizezi lista partenerilor actuali.




Serviciile care utilizează Google Maps nu sunt disponibile pe Medit Link China.

Caută parteneri


Poți căuta utilizatorii Medit Link pe baza numelui și/sau a adresei afacerii lor.

În rezultatele căutării, poți trimite o cerere de parteneriat unei întreprinderi cu care dorești să colaborezi.

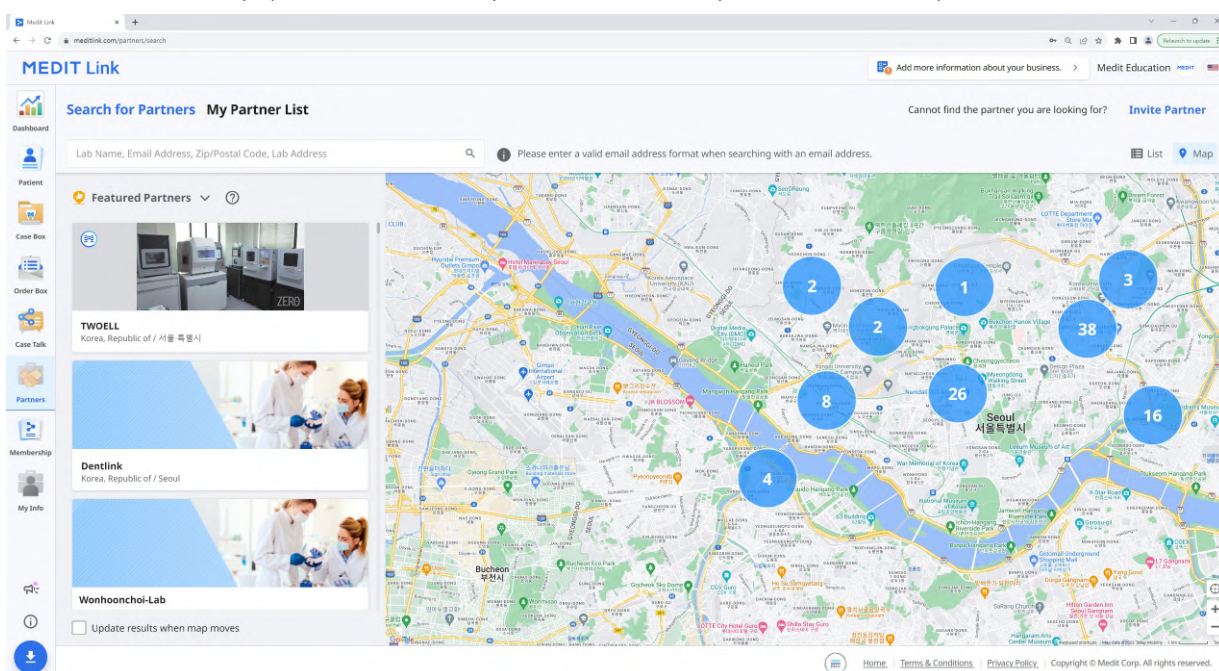

Lista mea de parteneri

Poți revizui parteneriatele tale actuale cu toate întreprinderile partenere existente în Lista mea de parteneri.

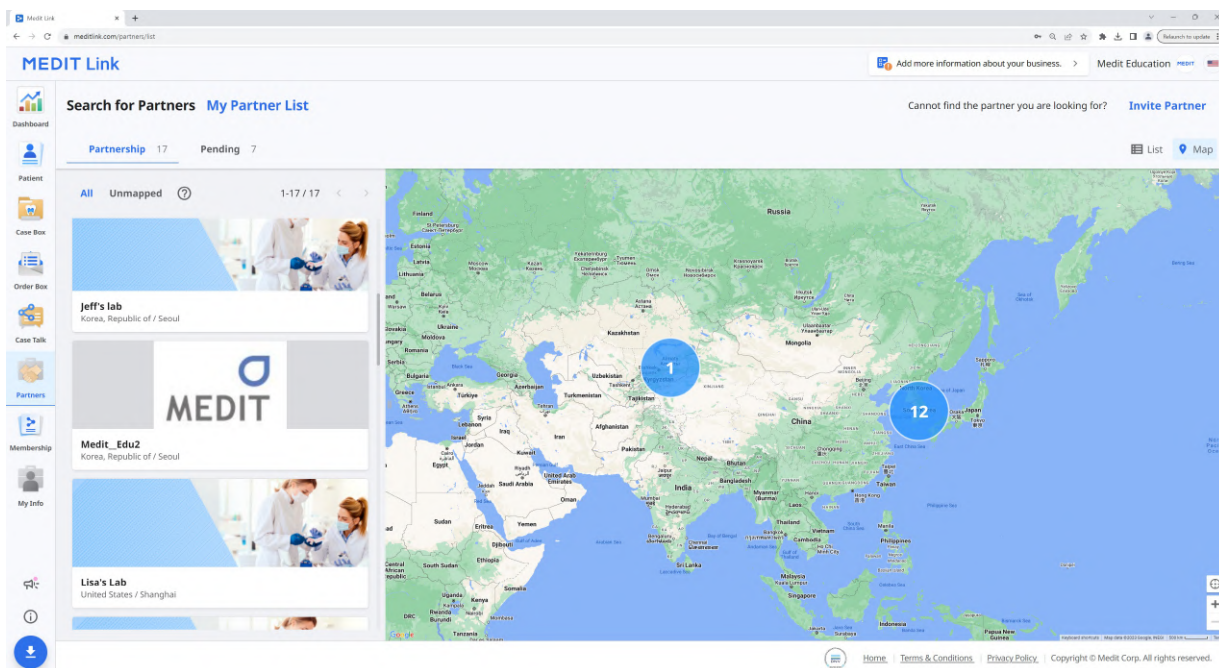

Invitarea partenerilor

Dacă ai o clinică sau un laborator cu care dorești să lucrezi, îi poți invita să se alăture Medit Link. Parteneriatul va fi format automat odată ce aceștia acceptă invitația.

1. Clic pe „Invită partener” în partea din stânga sus a ecranului.
2. Introdu adresa de e-mail a unei întreprinderi cu care dorești să lucrezi și trimite-i o invitație cu o cerere de parteneriat.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

3. Odată ce organizația invitată acceptă invitația și se înscrie la Medit Link, parteneriatul va fi stabilit în mod automat.

Membership

Abonament

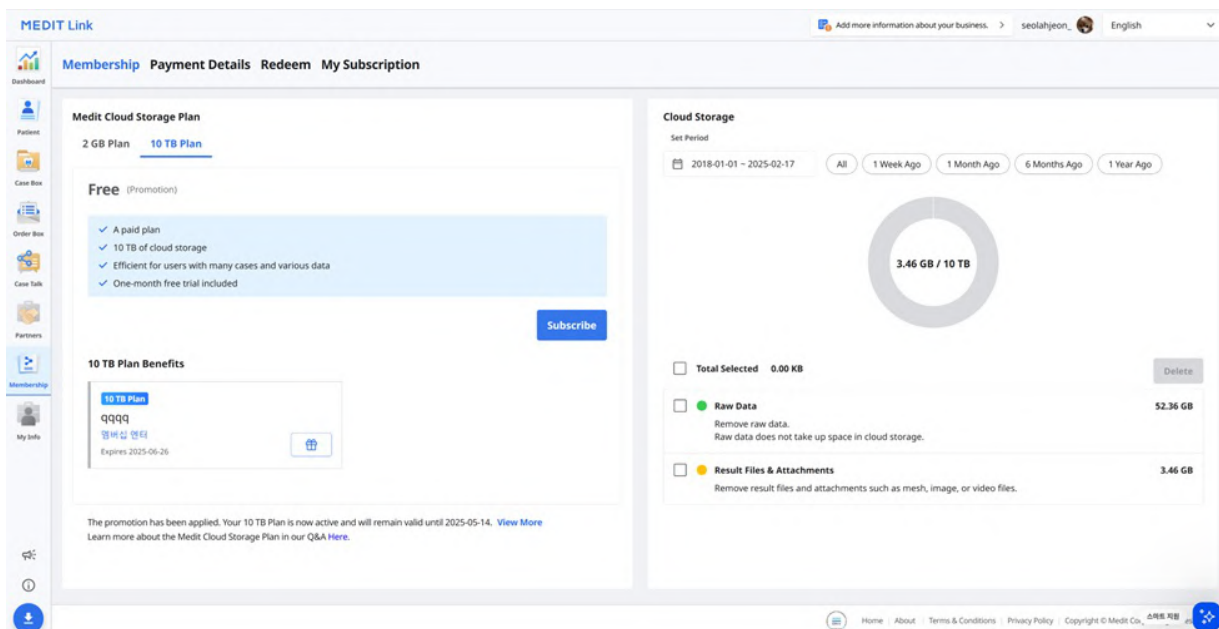

Medit Cloud Storage Plan

Poți vedea ce oferă fiecare plan, inclusiv cupoane de reducere și vouchere, precum și starea actuală a abonamentului tău. Poți să-ți îmbunătățești planul sau să-ți anulezi abonamentul în orice moment.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Membership

Payment Details

Redeem

My Subscription

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan

10 TB Plan

Free (Promotion)

✓ A paid plan

✓ 10 TB of cloud storage

✓ Efficient for users with many cases and various data

✓ One-month free trial included

Subscribe

10 TB Plan Benefits

2 GB Plan

AI Crown | Redefine Your Performance

Dentbird by Imagoworks

Expires 2025-06-30

The promotion has been applied. Your 10 TB Plan is now active and will remain valid until 2025-05-14. [View More](#)

Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Medit Link oferă următoarele planuri de stocare în cloud:

2 GB Plan

- Plan standard gratuit pentru toți utilizatorii înregistrați
- 2 GB de stocare în cloud
- Pentru utilizatorii noi

10 TB Plan

- Plan plătit
- 10 GB de stocare în cloud
- Pentru utilizatorii cu multe cazuri și diverse date
- O lună de probă gratuită


	2 GB Plan	10 TB Plan
Spațiu de stocare Cloud	2 GB	10 TB
Taxă lunară	Gratuit	\$9.99/lună
* Stocarea în cloud nu ia în considerare datele neprelucrate pentru spațiul utilizat.		



Planurile de abonament vor fi disponibile pe Medit Link China. Te poți bucura de 10 TB Plan gratuit până la lansarea oficială a funcției.

Spațiu de stocare Cloud

În secțiunea din partea dreaptă, poți gestiona stocarea în cloud.

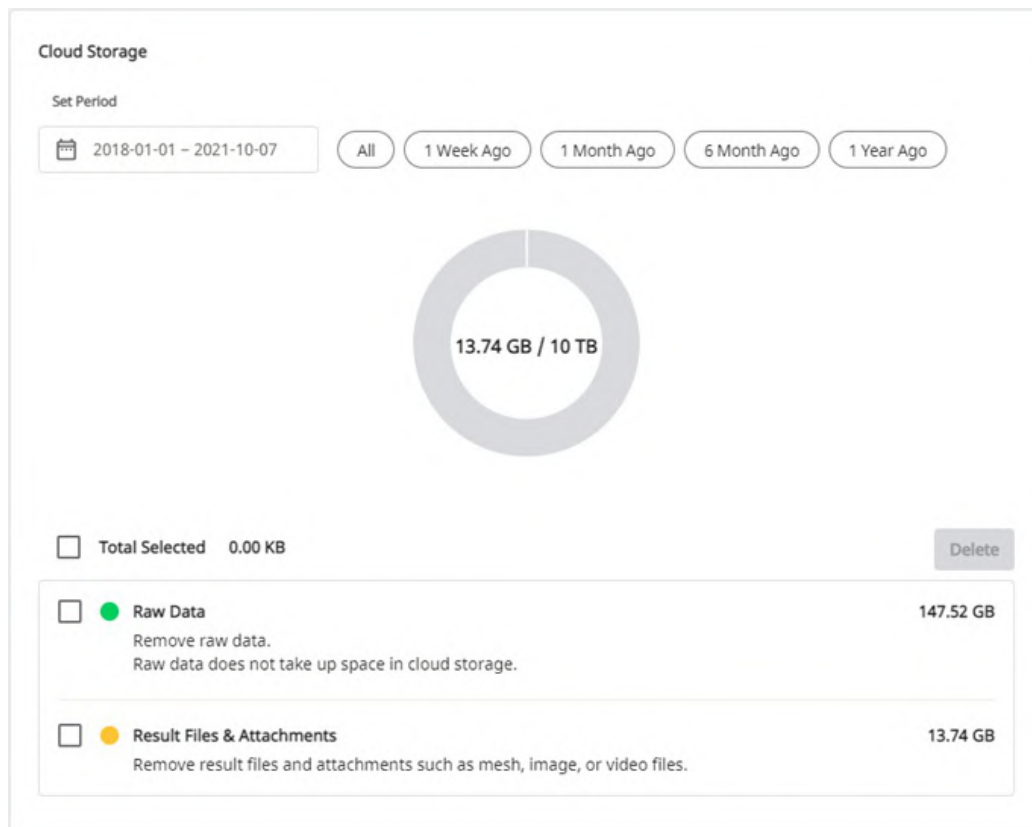

Setează perioada	Setează perioada specifică pentru a șterge datele create în acest interval de timp. • Toate: Vezi toate fișierele. • Acum o săptămână: Vezi fișierele care au trecut o săptămână de la creare. • Acum o lună: Vezi fișierele care au fost create acum o lună. • Acum 6 luni: Vezi fișierele care au fost create acum șase luni. • Acum 1 an: Vezi fișierele care au fost create acum un an.
Date neprelucrate	Datele neprelucrate nu ocupă spațiu în spațiul de stocare în cloud, așa că nu vor fi incluse în graficul pi. Dar poți gestiona datele brute de aici, dacă este necesar, de exemplu, le poți șterge pentru a proteja informațiile private ale pacientului.
Rezultat & Atașament	Fișierele rezultate și fișierele atașate ocupă spațiu în cloud. Dacă cloud-ul este plin, poți asigura mai mult spațiu de stocare prin eliminarea fișierelor inutile.
Șterge	Elimină fișierele selectate din spațiul de stocare în cloud pentru a elibera spațiu.

Abonează-te

Dacă în prezent ești abonat la 2 GB Plan sau la 10 TB Plan cu un cod de răscumpărare, te poți abona la 10 TB Plan.

Plata se realizează prin intermediul serviciului Stripe (www.stripe.com).

1. Mergi la Abonament > Medit Cloud Storage Plan > 10 TB Plan și clic pe butonul „Abonare”.

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan **10 TB Plan**


Free (Promotion)

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

2. Verifică descrierea 10 TB Plan și apasă din nou pe „Abonare”.

Subscribe Membership

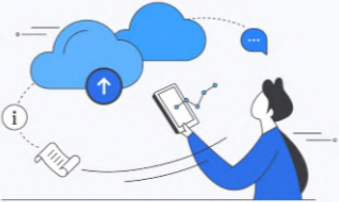

10 TB Plan

9.99\$ USD / Monthly

- ✓ Subscribe now to keep your 10 TB Plan after the promotion expires.
- ✓ You will pay a subscription fee after the current promotion expires. If you don't wish to pay, you can unsubscribe before payment.

* VAT is not included.
* Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Cancel **Subscribe**

3. Verifică prețul și condițiile și introdu informațiile necesare pentru plată. Apoi, clic pe „Abonare”.

←

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00

Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	\$9.99
Medit Cloud Storage Plan	
Billed daily	
Subtotal	\$9.99
👉 1 Month Free for New Subscribers	-\$9.99
100% off for a day	
Tax ⓘ	\$0.00
Total due today	\$0.00

Pay with card

Email yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by stripe Terms Privacy

4. Plata poate dura câteva secunde. Când ai terminat, vei vedea un mesaj de confirmare.

Subscribe Membership



Payment Successful.

Invoice


Close

Anulează abonarea

Poți anula abonamentul în orice moment. După anulare, poți utiliza în continuare 10 TB Plan pentru zilele rămase din luna plătită. Planul tău va fi schimbat la 2 GB Plan din următoarea zi de plată, iar spațiul de stocare în cloud va fi limitat la 2 GB. Dacă capacitatea de stocare în cloud este depășită, fișierele nu vor fi salvate, iar funcțiile de comandă și partajare nu vor fi disponibile.

1. Clic „Dezabonare”.
2. Clic „Anulează abonarea”.

Cancel Subscription

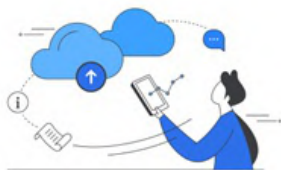

Are you sure you want to cancel your **10 TB Plan**?

✓ By confirming, you will automatically be switched to the free 2 GB Plan.
Enjoy full access to the features and storage of your current plan through to 2025-02-20.

ⓘ Please note that all uploaded files will be retained regardless of the plan you choose.
If your storage exceeds the 2 GB limit, you won't be able to upload new files.

*Click [here](#) to learn more about our membership plans.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

3. Pentru a confirma că nu vrei să te mai abonezi, fă clic din nou pe „Anulare abonament” în noua fereastră pop-up.

Confirm Subscription Cancellation

Your subscription will be canceled on 2025-02-20.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

4. Abonamentul tău a fost anulat.

Confirm Subscription Cancellation


Your subscription has been canceled.
You can use your current plan until 2025-02-20. After that, the cloud capacity will be limited to 2 GB.
If the used space exceeds the limit, data will not be backed up, and functions such as Order and Share will not be available.

Close

5. Planul tău va fi schimbat la 2 GB Plan din următoarea zi de plată, iar spațiul de stocare în cloud va fi limitat la 2 GB. Dacă capacitatea de stocare în cloud este depășită, fișierele nu vor fi salvate, iar funcțiile de comandă și partajare nu vor fi disponibile.

Abonamentul meu

Poți să vizualizezi detaliile abonamentului tău curent, să te reabonezi sau să îl anulezi din Abonamentul meu. De asemenea, poți schimba metoda de plată, care va fi aplicată începând cu următoarea plată programată.

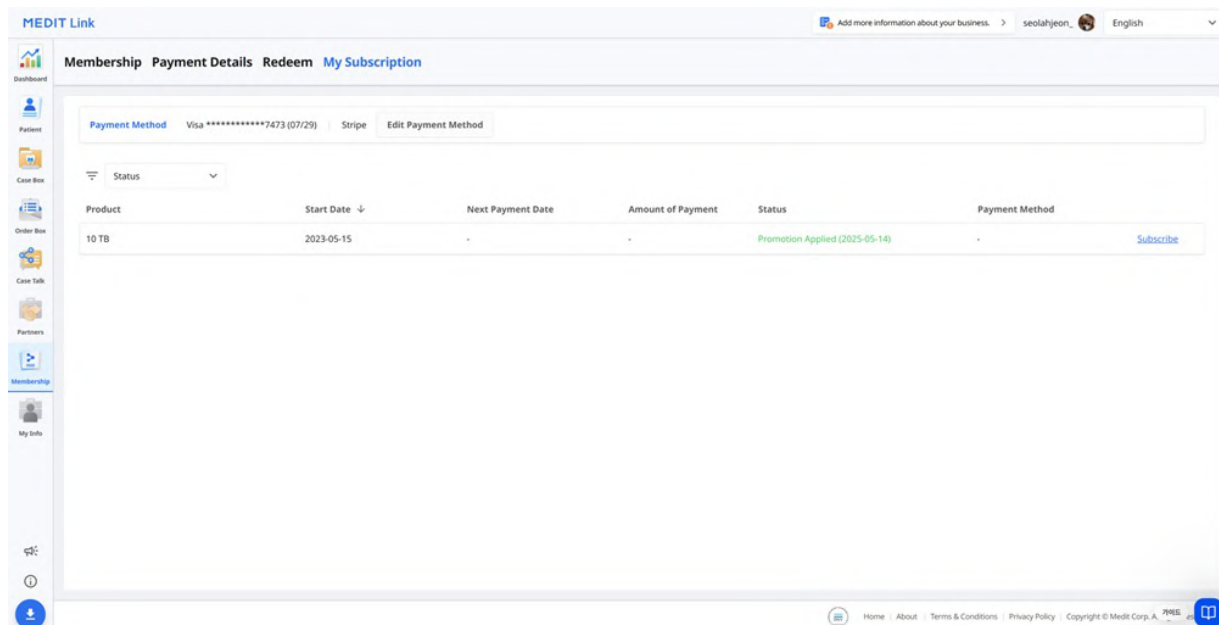

Detalii


Obiect	Descriere
Produs	Afișează tipul de abonament.
Data de început	Afișează data la care a început abonamentul sau promoția.
Următoarea dată de plată	Afișează data următoarei plăți.
Sumă de plată	Afișează suma de plată.
Statut	Abonament • Activ: Abonamentul este activ. • Expiră: Abonamentul nu se va reînnoi la următoarea dată de plată și va fi anulat. • Expirat: Abonamentul a expirat. Promoție • Promoție aplicată: Codul promoțional este acum activ. • Promoție în așteptare: Codul promoțional este în așteptarea activării. • Promoția a expirat: Codul promoțional a expirat.
Metodă de plată	Afișează ultimele patru cifre ale cardului utilizat pentru plată.

Reabonare


Obiect	Descriere
Plan de stocare cloud	Clic pe butonul de abonare pentru a te reabona la 10 TB Plan.
Plan de abonament la aplicație	Conectează-te la aplicație pentru a te reabona.

Cum să adaugi o metodă de plată

1. Clic pe „Editează metodă de plată”.

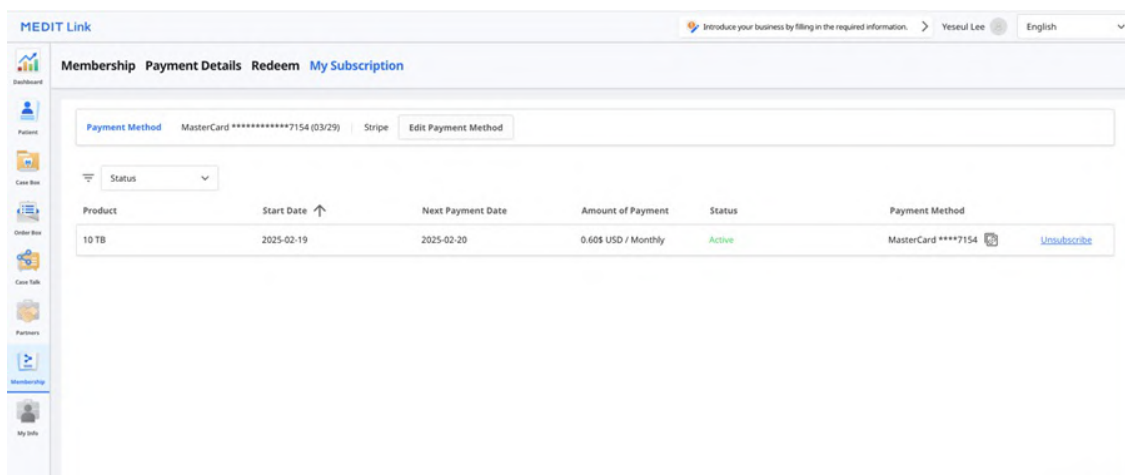

2. Clic pe „Adaugă metodă de plată”.

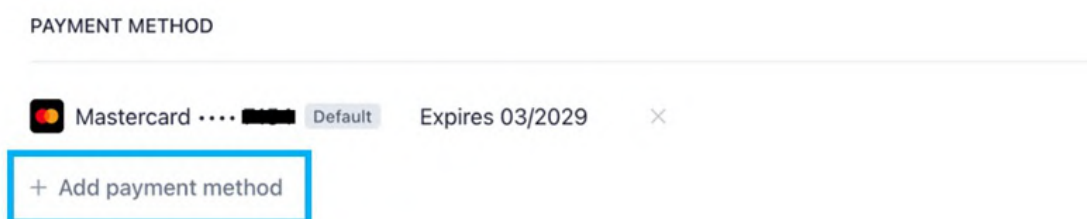

3. Introdu informațiile necesare și clic pe „Adaugă”.

Add payment method

Card number

1234 1234 1234 1234 

Expiration date Security code

MM / YY CVC 

Country

South Korea 

By providing your card information, you allow Medit USA Inc to charge your card for future payments in accordance with their terms.

☒ Use as default payment method

Add

Go back

4. Metoda de plată nou adăugată va fi setată ca metodă implicită și va fi utilizată de la următoarea dată de plată.

PAYMENT METHODS

 Visa •••• 4242	Default	Expires 04/2044	×
 Visa •••• 4242		Expires 05/2025	...
+ Add payment method			

Cum să schimbi o metodă de plată

1. Clic pe pictograma de meniu extins de lângă metoda de plată pe care vrei să o schimbi în fereastra de dialog privind facturarea.

PAYMENT METHODS

 Visa •••• 4242	Default	Expires 04/2044	×
 Visa •••• 4242		Expires 05/2025	...
+ Add payment method			

2. Clic pe „Stabilește ca implicit” pentru a seta cardul selectat ca metodă de plată implicită.

CURRENT SUBSCRIPTION

[DEV] Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics
\$9.99 per day

[View details](#) ▾

Your subscription renews on February 20, 2025.

PAYMENT METHODS

 Visa •••• 4242	Default	Expires 04/2044	×
 Visa •••• 4242		Expires 05/2025	...
+ Add payment method			
Make default Delete			

Răscumpără

Poți răscumpăra un cod promoțional pentru a accesa gratuit 10 TB Plan.

Detalii

MEDIT Link
Add more information about your business.
seolah.jeon_dev_admin
English

Membership
Payment Details
Redeem
My Subscription

Register Redeem Code
Register

Redeem Code
All

	Product	Promotion	Code Number	Registration Date	From	To	Status	
4	Premium	4 Clinic Premium Promotion	2A6F-0125-6747-4A87	2022-03-16	2021-10-01	2021-10-05	Waiting	Cancel

1

Home
About
Terms & Conditions
Privacy Policy
Copyright © Medit Corp.
GUIDES

Obiect	Descriere
Prodot	Afișează planul la care se aplică promoția.
Promoție	Afișează numele promoției.
Numarul codului	Afișează numărul de cod.
Data înregistrării	Afișează data la care a fost înregistrat codul.
De la	Afișează data de începere a promoției.
Către	Afișează data de expirare a promoției.
Statut	- Registered: Codul promoțional a fost adăugat și este acum disponibil. - Waiting: Codul promoțional este în așteptarea activării. - Activated: Codul promoțional este acum activ. - Used: Codul promoțional a expirat.

Înregistrează codul răscumpărării

- Introdu codul de răscumpărare și clic „Înregistrează-te”.
- Citește anunțul și alege „Înregistrare” sau „Aplică” în fereastra de dialog care apare.
 - Înregistrează-te:** Înregistrează-te pentru a răscumpăra codul. Poți activa și utiliza codul de răscumpărare mai târziu, după înregistrare.
 - Aplică:** Înregistrează și activează codul de răscumpărare. Reducerea promoțională se aplică imediat.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
Periodic payments are stopped automatically.

[Close](#)[Register](#)[Apply](#)

Activează codul de răscumpărare

Poți înregistra mai multe coduri de răscumpărare, dar trebuie să îl activezi pe cel pe care dorești să îl folosești.

1. Clic pe butonul „Activează” de lângă codul pe care dorești să-l utilizezi.
 - Dacă nu există niciun cod cu statutul „Activated” cel pe care îl alegi va fi activat imediat.
 - În cazul în care există un cod deja activat, codul nou selectat trece la starea „Waiting”. Când codul de răscumpărare activat în prezent expiră, noul cod de răscumpărare aflat în starea „Waiting” va fi activat automat.

Aviz

Doar un singur cod de răscumpărare poate fi activat și doar unul singur poate fi în statutul „Waiting”.

Detalii Plată


Poți vizualiza abonamentul și istoricul plăților în fila Detalii plată.

The screenshot displays the 'MEDIT Link' web application. The top navigation bar includes the logo, a user profile 'Yeseul Lee', and a language selector set to 'English'. Below this, a secondary navigation bar shows 'Membership', 'Payment Details' (active), 'Redeem', and 'My Subscription'. The main content area features a filter bar with 'All', 'Membership', and 'Medit Apps' options, and a date range '2024-11-21 ~ 2025-02-19'. A table lists payment details with columns: Payment Date, Product, Payment Type, Duration, Details, Amount of Payment, and Status. The table contains one entry: Payment Date '2025-02-19', Product '10 TB', Payment Type 'Subscription', Duration '2025-02-19 ~ 2025-02-20', Details 'Monthly payment', Amount of Payment '0.00 \$ (USD)', and Status 'Payment Completed'. The bottom of the page has a footer with links to Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © MEDIT Corp. All rights reserved.

Obiect	Descriere
Dată de plată	Afișează data plății.
Produs	Afișează planul sau aplicația achiziționată.
Tip plată	Afișează tipul de plată: - Abonament - Plată unică
Durată	Afișează perioada de abonament.
Detalii	Afișează informații detaliate despre plată.
Sumă de plată	Afișează suma pentru un abonament sau o achiziție unică.
Statut	- Payment Completed: Plata a fost procesată. - Payment Failed: Plata nu a fost procesată. - Payment Incomplete: Plata nu a fost finalizată. Clic pe „Plătește acum” pentru a continua. - În așteptare: Plata este în așteptare pentru reînnoirea abonamentului.

Vezi detalii factură

Poți vizualiza facturile și chitanțele de plată făcând clic pe pictograma chitanță din dreapta.

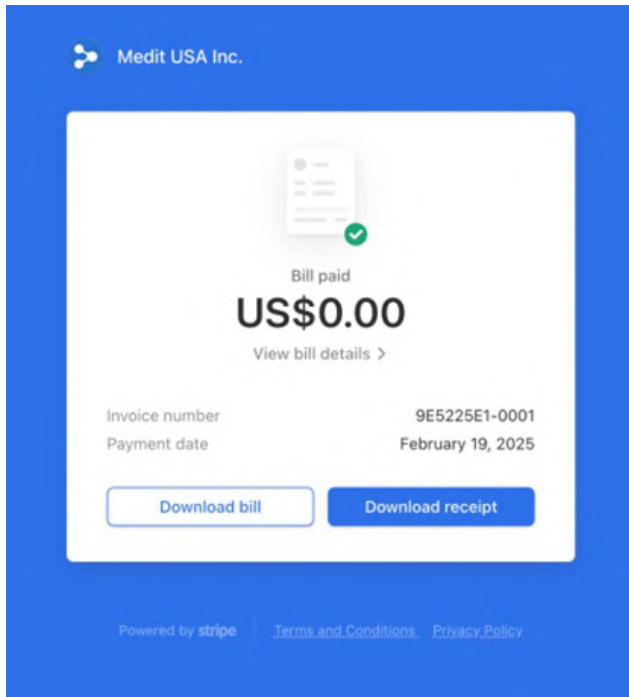

Clic pe „Vezi detalii factură” pentru detalii privind plata.

Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target	yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source	Medit USA Inc.
bill	#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025	
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	US\$0.60
Quantity 1 piece	
subtotal	US\$0.60
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)	
	-US\$0.60
Payment amount	US\$0.00
Amount paid	US\$0.00
Remaining amount	US\$0.00

Do you have any questions? [Contact Medit USA Inc.](#)

My Info

Contul meu

În My Info poți revizui și edita informațiile pe care le-ai furnizat în timpul înregistrării și poți verifica statutul tău de membru.

← → ↺ 🌐 www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info

My Account My Clinic My Scanner

Account Information



Email Address
seolah.jeon@medit.com
[Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
seolah.jeon_dev_admin

Language
English ▼

Country/Region
Korea, Republic of ▼

i Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Clinica mea/Laboratorul meu (Doar cont administrator)

Poți revizui și edita informațiile despre clinica sau laboratorul tău. Această secțiune este disponibilă numai pentru conturile de administrator.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info


My Account **My Clinic** My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

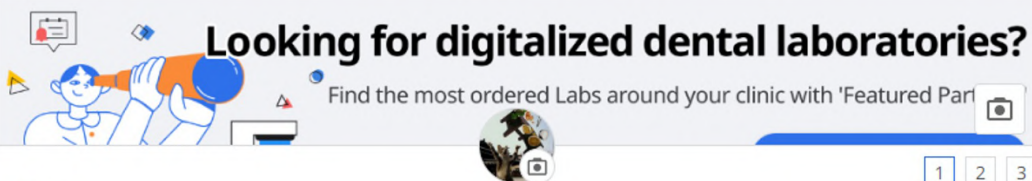

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'

1

2

3

Services

Select

▼

Specialties (choose up to 3)

Select

▼

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Scannerul meu

Poți verifica informațiile despre dispozitivul conectat pentru contul respectiv.

Obiect	Descriere
Tip	Afișează numele modelului.
Număr de serie	Afișează numărul de serie al dispozitivului.
Timp de utilizare	Indică durata utilizării dispozitivului.
Statut	Afișează starea de înregistrare a dispozitivului: • „Înregistrat” indică faptul că scanerul a fost conectat și înregistrat cu succes. • „Neînregistrat” indică faptul că scanerul nu mai este înregistrat. Dacă scanerul este înregistrat într-un grup diferit, acesta își va pierde înregistrarea în grupul curent.
Ultima conectare	Afișează data ultimei conexiuni.
Ultima calibrare	Afișează data ultimei calibrări.
Data de începere a garanției	Afișează data la care a fost activată garanția.
Data de expirare a garanției	Afișează data la care expiră garanția.
Zile rămase	Afișează numărul de zile rămase până la expirarea garanției.
Cumpără	Permite utilizatorului să achiziționeze și să extindă garanția.
Șterge pictograma	Permite utilizatorului să elimine scanerul din listă.

Alt meniu

Aviz & actualizare

Poți verifica anunțurile importante de la Medit și actualizările de program ale software-ului Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Site-uri web conexe

Poți obține diverse informații despre utilizarea Medit Link. Accesează resursele educaționale și informaționale ale Medit, cum ar fi Medit Academy, Medit Academy YouTube și Centrul de ajutor Medit.

64

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >



Help Center >

Descarcă Medit Link App

Poți descărca cea mai recentă versiune a programului de instalare de pe internet. Acest meniu este util atunci când pierzi programul de instalare furnizat în pachetul produsului sau când ai un program de instalare depășit.



Aviz

Medit Link se actualizează automat atunci când ai o conexiune la internet.



Windows

macOS

Prezentare generală

MEDIT Link 3.2.0

Patient

Total Patients: 94

Search: All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Bară de titlu	Consultă Medit Link App > Bară de titlu pentru informații detaliate.
2	Meniu	Consultă Medit Link App > Meniu pentru informații detaliate.
3	Instrumente și funcții	Consultă Medit Link App > Vizualizare fișier și Medit Link App > Vizualizează opțiuni pentru informații detaliate.
4	Lista cazurilor	Consultă Medit Link App > Filtrare și Caută pentru informații detaliate.

Tabelul de mai jos rezumă meniurile disponibile în fiecare tip de cont de clinică și de laborator.

Tip cont		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Conturi clinică	Administrator	O	O	O	X	X	O	O	O
	Membru	O	O	O	X	X	O	O * Numai funcția de restabilire	O
Cont de laborator	Administrator	X	X	X	O	O	O	O	O
	Membru	X	X	X	O	O	O	O * Numai funcția de restabilire	O

Bară de titlu

Bara de titlu furnizează acces rapid la funcții precum informațiile legate de cont, notificări, avize și actualizări, setări și starea rețelei.



Informațiile mele

Informațiile mele conține informațiile de bază ale utilizatorului cum ar fi profilul, numele clinicii sau al laboratorului, adresa de e-mail și numele de utilizator.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Notificări

Poți vedea notificările legate de parteneriate, comenzi și procese de lucru.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close


1	Bifează caseta pentru a afișa numai mesajele necitite.
2	Clic pe orice notificare pentru a accesa instantaneu cazul sau pagina web aferentă.

Aviz & actualizare

Poți verifica anunțurile importante de la Medit și actualizările de program ale software-ului Medit.

Setări

Dialogul Setări permite utilizatorilor să configureze programul.

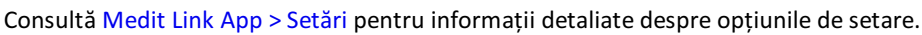

Medit Link îți permite să utilizezi toate funcțiile fără probleme atunci când ești conectat la o rețea.

69

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Dacă conexiunea la rețea nu este bună, este posibil să apară următoarele restricții:

- Unele funcții vor fi restricționate, precum comandarea unui caz, crearea unui caz, partajarea prin Case Talk și sincronizarea cloud.
- Performanța generală a serviciului poate fi redusă din cauza impactului mediului de rețea.

În acest caz, poți intra în modul offline pentru a efectua sarcini de bază, iar apoi să folosești funcțiile care necesită internet odată ce ești conectat.



Aviz

Simbolul rețelei indică viteza de răspuns între zona curentă și AWS (Amazon Web Service). Nu se referă la viteza rețelei, așa că, uneori, poate afișa starea ca fiind slabă sau proastă, chiar dacă viteza rețelei este suficient de mare.

În cazul în care celălalt proces utilizează aceeași rețea, viteza poate fi slabă sau proastă, iar performanța generală a Medit Link poate fi proastă. În acest caz, te rugăm să nu partajezi rețeaua cu alte procese. De exemplu, funcția „Încarcă date neprelucrate” este o parte uriașă a procesului de rețea. Dacă simbolul arată o stare slabă sau proastă, mergeți la Setări > Încarcă date neprelucrate și dezactivează „Încarcă automat”.

Setări

General

Oferă opțiuni pentru configurarea generală a sistemului.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

Salvează folder-ul	Specifică un dosar pentru a stoca rezultatele datelor generate în Medit Link și în programele conectate.	
Dosarul de instalare a aplicațiilor	Specifică o traiectorie de instalare pentru aplicațiile Medit Apps și aplicațiile partenere disponibile în App Box.	
Setări de limbă	Selectează limba pentru program.	
Etichetarea dinților	Selectează un sistem de etichetare a dinților între FDI și US.	
Notificări	Atunci când este bifată, vei primi notificări pentru actualizările programului.	
Încarcă date neprelucrate	Atunci când este bifată, datele neprelucrate sunt încărcate automat în cloud. Ajută la salvarea datelor originale și la efectuarea unei scanări fără întreruperi atunci când se utilizează Medit Link cu același cont pe un alt calculator. Salvarea în cloud a datelor originale se aplică numai datelor dobândite în Medit Scan for Clinics.	
Scanare rapidă	Alege dacă vrei ca etapele de scanare de mai jos să apară automat în Medit Scan for Clinics fără să fie nevoie să completezi informațiile din formular. • Maxilar pre-operator • Mandibulă pre-operator • Scanare față	
Opțiuni de vizualizare	Redare avansată	Atunci când este bifată, modelul 3D este afișat într-o redare mai vie și mai realistă.
	Ajustează textura culorilor	Ajustează luminozitatea modelului 3D. * Culoarele rezultate pot fi ușor diferite față de Medit Link atunci când deschizi aceleași date cu un alt software.
Programul de îmbunătățire a experienței utilizatorilor Medit	Alătură-te Programului de îmbunătățire a experienței utilizatorilor Medit. • Utilizăm informațiile colectate pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile. • Nu colectăm nicio informație care să permită identificarea persoanelor fizice.	
Pagina implicită după conectare	Selectează meniul implicit care va fi afișat la pornirea programului. • Conturile de clinică pot fi alese între Patient și Case Box • Conturile de laborator pot alege între In Box și Work Box	

Managementul stocării

Verifică și gestionează spațiul de stocare local și în cloud.

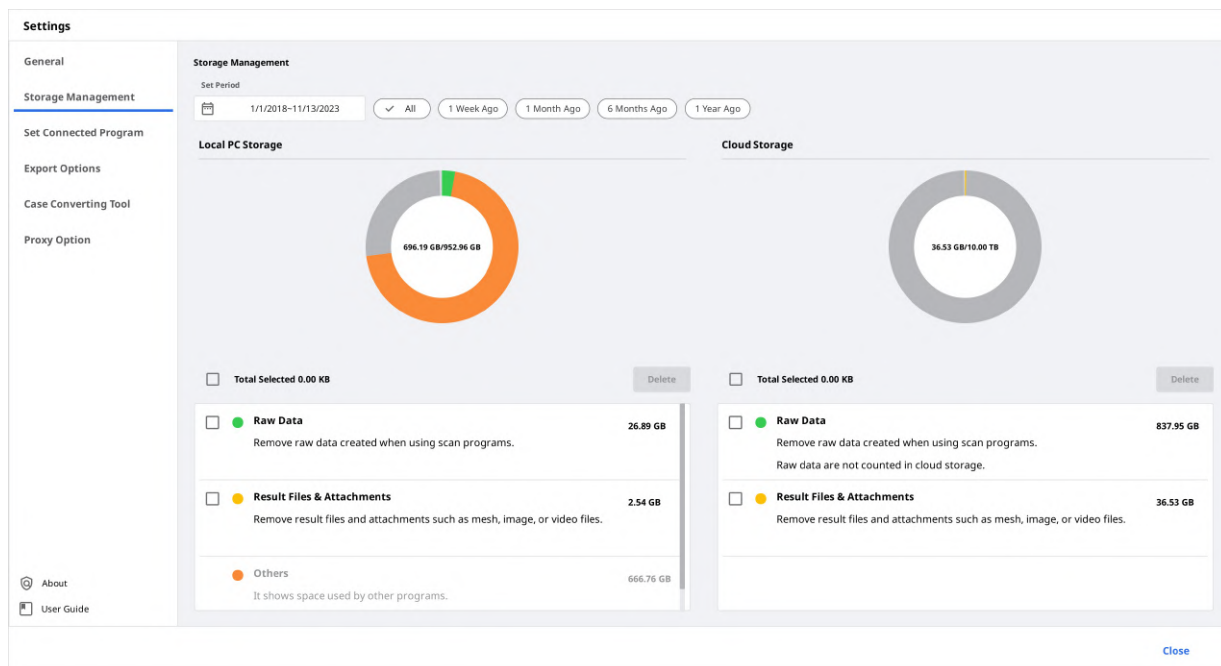

Setează perioada

Stabilește perioada specifică pentru a șterge datele create în intervalul de timp de mai jos.

- Toate: Vezi toate fișierele.
- Acum o săptămână: Vezi fișierele care au trecut o săptămână de la creare.
- Acum o lună: Vezi fișierele care au fost create acum o lună.
- Acum 6 luni: Vezi fișierele care au fost create acum șase luni.
- Acum 1 an: Vezi fișierele care au fost create acum un an.

Stocare locală

Gestionează spațiul de stocare al calculatorului.

Date neprelucrate	Elimină datele brute selectate de pe PC. Dacă datele neprelucrate sunt deja încărcate în cloud, le poți descărca și utiliza oricând dorești.
Rezultat & Atașament	Elimină fișierele rezultate și fișierele atașate de pe PC, cum ar fi rețele, imagini și videoclipuri. Dacă aceste fișiere sunt deja încărcate în cloud, le poți descărca și utiliza oricând dorești.
Altele	Consultă fișierele utilizate pentru a opera sistemul și alte programe. Afișează spațiul de stocare al calculatorului tău. Nu poți elimina aceste fișiere din Medit Link.
Șterge	Elimină fișierele selectate de pe calculator.

Spațiu de stocare Cloud

Gestionează spațiul de stocare în cloud.

Date neprelucrate	Datele neprelucrate nu ocupă spațiu în spațiul de stocare în cloud, așa că nu vor fi incluse în graficul pi. Dar poți gestiona datele neprelucrate de aici, dacă este necesar, de exemplu, le poți șterge pentru a proteja informațiile private ale pacientului, etc.
Rezultat & Atașament	Rezultatul și fișierele atașate ocupă spațiu în spațiul de stocare în cloud. Dacă cloud-ul este plin, poți asigura mai mult spațiu de stocare prin eliminarea fișierelor inutile.
Cumpără stocare	Dacă ești abonat la 2 GB Plan, abonează-te la 10 TB Plan pentru a-ți extinde spațiul de stocare în cloud.
Șterge	Elimină fișierele selectate din spațiul de stocare în cloud pentru a elibera spațiu de stocare.

Setează programul conectat

Administrează programele care sprijină integrarea în Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

 About

User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒ **Medit Scan for Clinics**

C:/ReleaseBuild/3.3.0.100_Release/Medit_iScan.exe

Apply

Close

Poți conecta următoarele programe:

	Contul clinicii	Cont de laborator
Program de scanare	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs



Aviz

Integrarea următoarelor servicii nu este disponibilă pentru Medit Link pentru Mac.

- [Medit Scan for Labs](#)

Opțiuni de export

Stabilește modul de export al fișierelor din Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply


Close

75

Tip	Selectează programul CAD pe care vrei să îl folosești pentru proiectare. Programul va ajusta rezultatele pe baza selecției tale, permițându-ți să continui cu proiectarea fără nicio aliniere suplimentară a axelor.
Exportă fișiere în	Specifică calea în care dorești să stochezi rezultatele.
Format rețea	Specifică formatul fișierului final al rețelei.
Format imagine	Specifică formatul fișierelor de imagine exportate.
Comprimare și combinare	Comprimă fișierele: Comprimă toate rezultatele într-un singur fișier. Combină rețeaua individuală: Combină toate rezultatele pentru maxilar sau mandibulă într-un singur fișier. Atunci când folosești unele programe care nu pot importa și lucra cu mai multe fișiere, le poți unifica într-unul singur pentru a lucra în acele programe.
Opțiuni pentru situațiile în care același folder sau fișier există deja.	Alege acțiunea implicită pentru cazurile în care există același dosar sau nume de fișier în calea țintă. • Întreabă întotdeauna când exporti. • Exportă un nou fișier și suprascrie fișierele existente. Fișierul stocat în prezent va fi pierdut. • Creează un folder și exportă fișierele
Regula pentru numele folderului	Definește regulile de creare a unui nume de dosar la exportul de fișiere. Regula setată va fi aplicată la denumirea dosarelor, iar fișierul exportat va fi salvat în dosarul creat. Informațiile de mai jos pot fi folosite pentru a stabili regula. • Cont clinică Data creării cazului, Data scanării, Data comenzii, Numele pacientului, Numele cazului, Numele partenerului, ID-ul pacientului, ID-ul comenzii • Cont de laborator Data creării cazului, Data scanării, Data comenzii, Numele pacientului, Numele cazului, Numele partenerului, ID-ul comenzii
Regula pentru numele fișierului	Definește reguli pentru numele fișierelor exportate. Informațiile de mai jos pot fi folosite pentru a stabili regula. • Cont clinică Data creării cazului, Data scanării, Data comenzii, Numele pacientului, Numele cazului, Numele partenerului, ID-ul pacientului, ID-ul comenzii • Cont de laborator Data creării cazului, Data scanării, Data comenzii, Numele pacientului, Numele cazului, Numele partenerului, ID-ul comenzii

Instrument de conversie a cazurilor


Poți muta cazurile între diferite conturi exportând cazurile contului sau importând cazurile exportate din alte conturi.

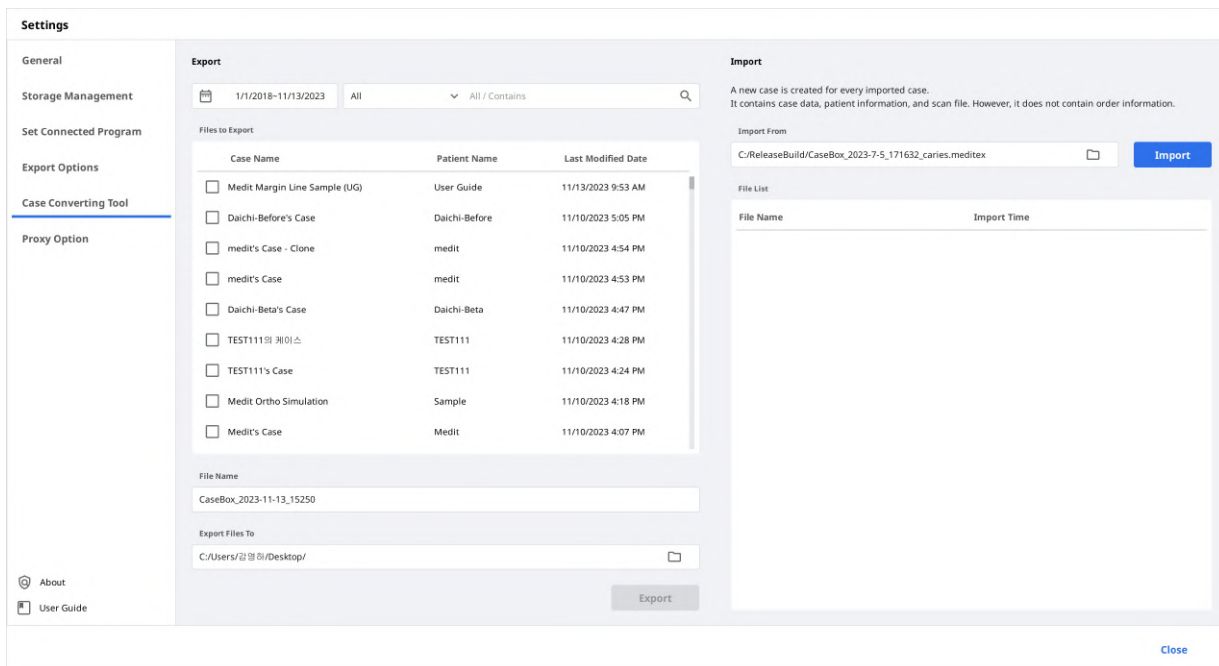


Exportă caz

Exportă cazurile contului conectat acum în calculatorul local.


1. Deschide Medit Link și clic pe pictograma Setări.

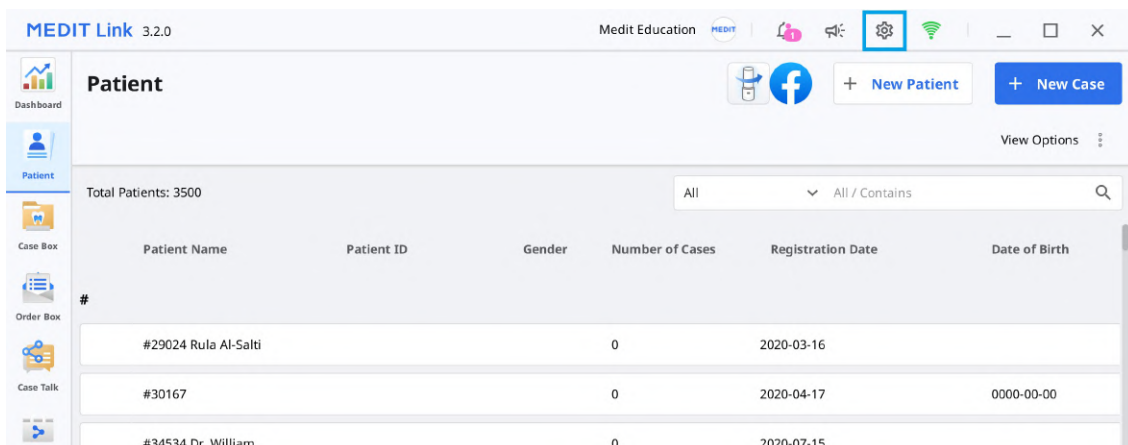


2. Alege secțiunea „Instrument de conversie a cazurilor” din meniul din partea stângă.

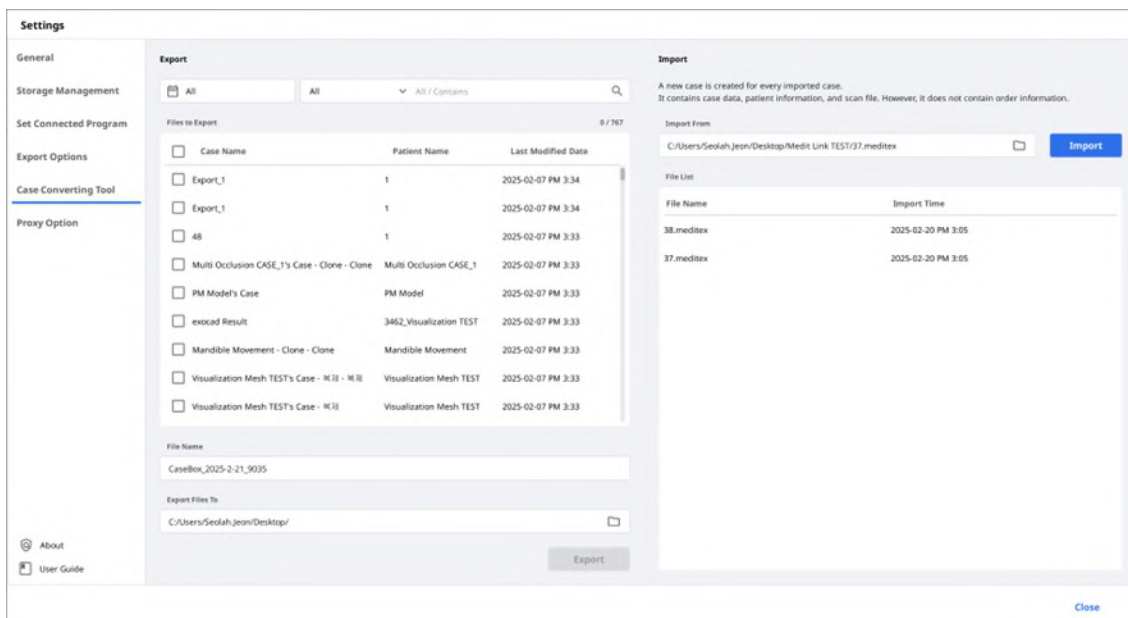

3. În secțiunea Exportă, stabilește o perioadă sau caută cazuri de exportat dacă este necesar.

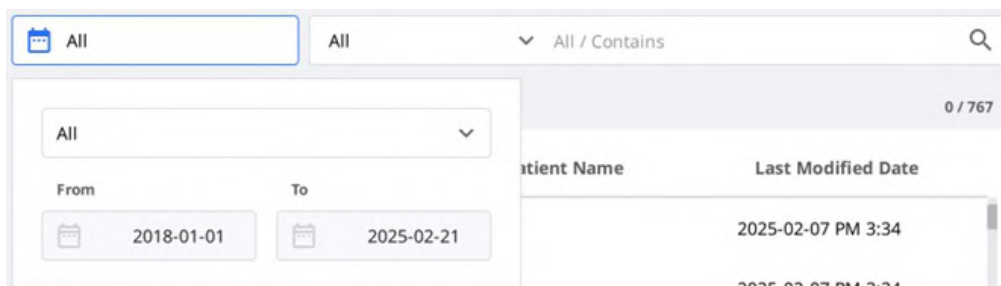

4. Alege cazurile pe care vrei să le exporti din lista din secțiunea „Fișiere la Exportă”.

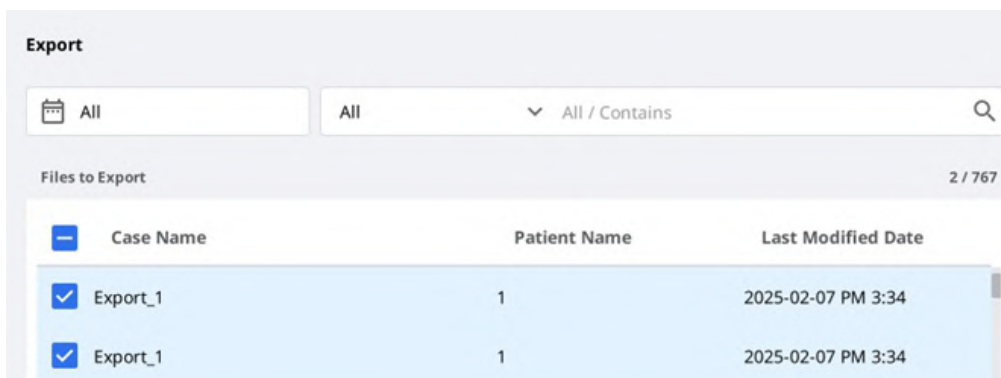

5. Setează numele fișierului editând numele cazurilor în câmpul Nume fișier.
6. Setează destinația dosarului pentru a exporta cazurile selectate.
7. Clic „Exportă”.
8. Clic „Da” pentru a deschide fișierul unde sunt exportate fișierele.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. Cazurile exportate sunt salvate în formatul de fișier .meditex.

Importă caz

1. Deschide Medit Link și clic pe pictograma Setări.

MEDIT Link 3.2.0 Medit Education

Patient

Total Patients: 3500

All / Contains

#	Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
	#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
	#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
	#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

- Alege secțiunea „Instrument de conversie a cazurilor” din meniul din partea stângă.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

All / Contains

Files to Export 0 / 767

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34
☐ Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34
☐ 48	1	2025-02-07 PM 3:33
☐ Multi Occlusion CASE_1's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion CASE_1	2025-02-07 PM 3:33
☐ PM Model's Case	PM Model	2025-02-07 PM 3:33
☐ exocad Result	3462_Visualization TEST	2025-02-07 PM 3:33
☐ Mandible Movement - Clone - Clone	Mandible Movement	2025-02-07 PM 3:33
☐ Visualization Mesh TEST's Case - WII - WII	Visualization Mesh TEST	2025-02-07 PM 3:33
☐ Visualization Mesh TEST's Case - WII	Visualization Mesh TEST	2025-02-07 PM 3:33

File Name

CaseBox_2025-2-21_9035

Export Files To

C:/Users/Seolah.Jeon/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/Users/Seolah.Jeon/Desktop/Medit Link TEST/37.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
38.meditex	2025-02-20 PM 3:05
37.meditex	2025-02-20 PM 3:05

Close

- În secțiunea Importă, clic pe pictograma dosarului pentru a căuta pe calculator fișierul .meditex pe care dorești să-l exporti.

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

- Clic butonul „Importă” și verifică fișierele pe care le importi în lista de mai jos.

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex 

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

5. Cazul importat va apărea, de asemenea, în Case Box (cont de clinică) sau în Work Box (cont de laborator).

Opțiuni proxy

În unele medii de rețea limitate, poți modifica setările de rețea.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

Despre

Afișează informații detaliate despre Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name	Medit Link
Version	3.3.0
Build Number	123
Server	Operation Korea
UDI DI	(01)8800026700449
UDI PI	(10)3.3.0

Medit Corp.

품목명	1등급 치과 영상 전송장치소프트웨어
모델명	ML-STD001
품목별제조신고번호	제신 25-112호
사용방법 및 사용시 주의 사항	사용설명서 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
제조자의 상호:	(주)메디트
제조자의 주소:	서울특별시 영등포구 양평로 25길 8 9층, 10층
제조자의 연락처:	+82-2-2193-9600

본 제품은 「디지털의료기기소프트웨어」임

 2025.03

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☐ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Manualul utilizatorului


Obține manualul de utilizare pentru Medit Link.

Deschiderea ghidului utilizatorului necesită o conexiune la internet.

Meniu

Dashboard

Poți vizualiza statisticile pentru întreaga activitate desfășurată pe Medit Link în grafice și diagrame vizualizate - atât în aplicația Medit Link App, cât și pe Web.

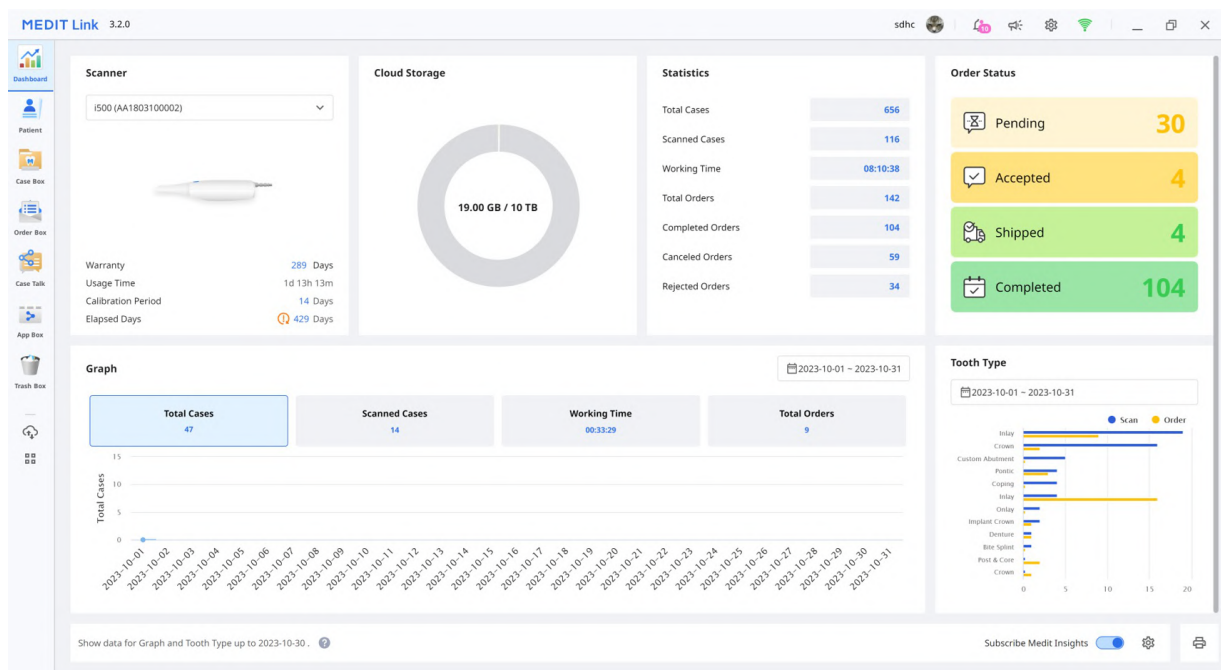

Consultă [Dashboard > Medit Link Web](#) pentru mai multe informații despre dashboard și Medit Insights.

Patient

Poți adăuga, edita, șterge sau fuziona pacienții în meniul Patient.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scanned Date	Last Modified Date	Registration Date
aggdsfsgd				1			2020-09-24 PM 5:03
addTEST				1			2021-06-17 AM 11:54
aaaa				1			2023-04-22 PM 4:25
aaa				1			2023-04-22 PM 5:08
aa				1			2023-03-06 PM 6:32
a				1			2023-05-31 PM 2:07
Arch test				1			2020-08-17 PM 12:26
Arch Order Test				2			2020-09-01 PM 2:17
Abutment Scan				1	2022-04-04 PM 2:23		2022-04-04 PM 2:15
Abutment Cut test				1	2019-12-05 PM 6:03		2019-12-05 PM 5:59
AAA				1			2023-08-16 PM 4:06

Adaugă pacient nou

1. Clic „Pacient nou”.

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

YYYY MM DD

Patient ID

Phone Number

Email Address*

Memo


Cancel Save

2. Completează informațiile necesare în fereastra de dialog Pacient nou, apoi clic pe „Salvează”.

Șterge pacienți

Poți șterge un pacient numai atunci când nu mai există cazuri pentru pacient.

1. Selectează pacientul pe care dorești să îl ștergi din listă.

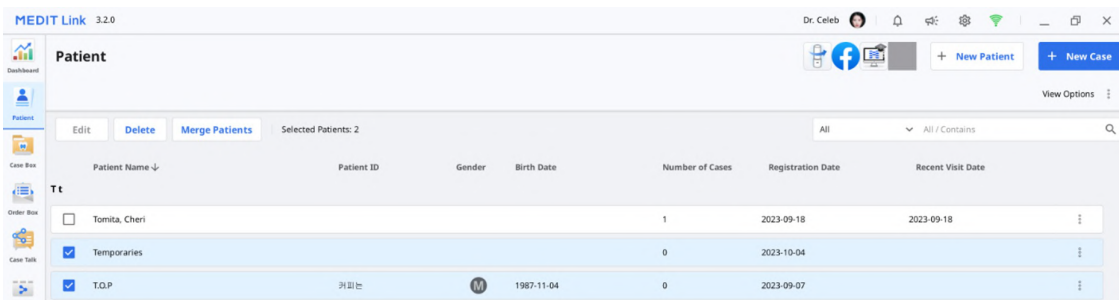


2. Clic „Șterge”.

Combină pacienți

Poți unifica toate cazurile mai multor pacienți într-un singur pacient.

1. Selectează din listă pacienții pe care vrei să îi unifici.

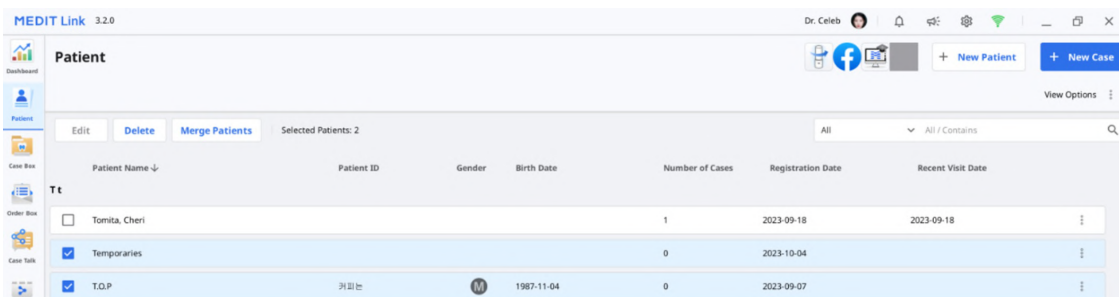

2. Clic „Combină pacienți”.
3. Selectează pacientul țintă în care vrei să fuzionezi toate cazurile.
4. Toate cazurile sunt comasate în pacientul țintă, iar informațiile despre pacient sunt păstrate.

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel
Apply

5. Clic „Aplică” pentru a continua cu fuzionarea.

Case Box/Work Box

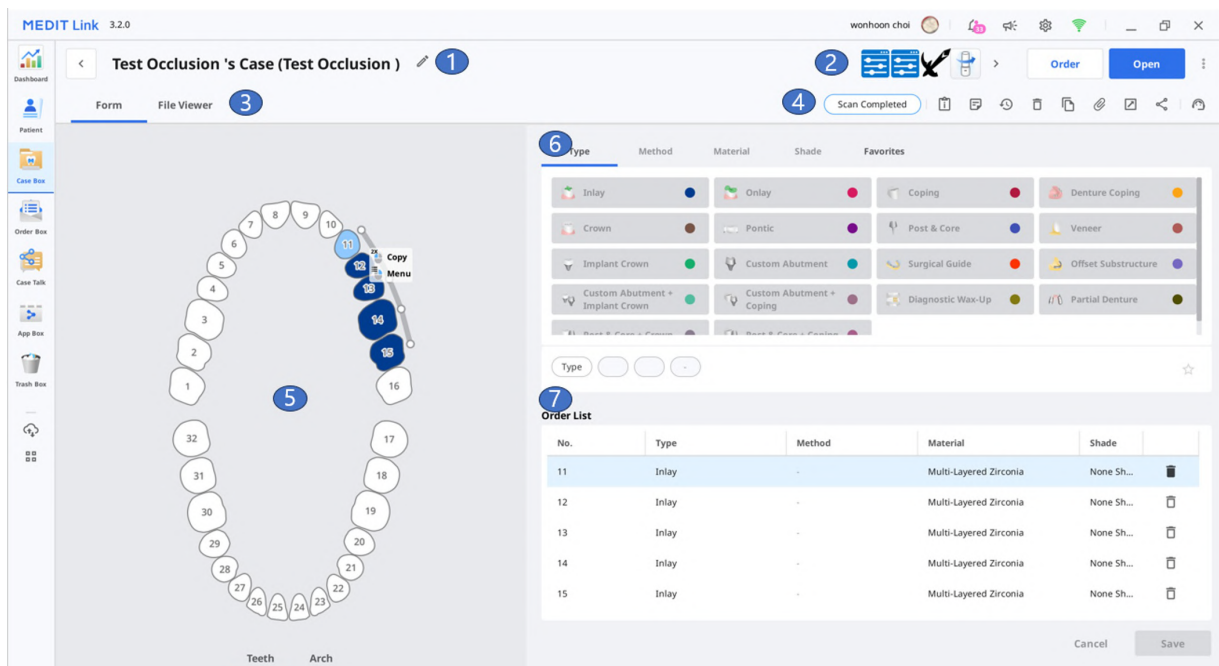

1	Afișează numele cazului și numele pacientului.
2	Furnizează principalele caracteristici disponibile: Buton de scanare sau de deschidere, buton de comandă, pictograme ale aplicației.
3	Afișează fișele disponibile: Formular, Vizualizare fișier.
4	Afișează funcțiile de gestionare a cazurilor și a dosarelor.
5	Afișează interfața de înregistrare a formularului pentru programul de scanare selectat.
6	Furnizează informații privind tipul/metoda/materialul/nuanța pe care utilizatorii le pot alege pentru numărul de dinți selectat.
7	Afișează tipul/metoda/materialul/informațiile privind nuanțele aplicate dinților selectați.

File în Case Box/Work Box

Formular	Vizualizare fișier
Fila Formular oferă o interfață de utilizare pentru introducerea informațiilor de bază pentru scanarea lucrărilor, cum ar fi tipul, metoda, materialul pentru numerele dinților și opțiunile de scanare. Informațiile pe care le introduci sunt transmise programului de scanare conectat și sunt utilizate ca informații de comandă atunci când se plasează o comandă la partenerul tău.	Vizualizează fișierele de rezultate generate de programele de scanare și CAD. Vizualizatorul de fișiere afișează și gestionează modelele 3D și imaginile 2D achiziționate sau atașate.

Funcții în Case Box/Work Box

Sunt prevăzute următoarele funcții în Case Box/Work Box.

	Status caz	Afișează statutul cazului.
	Mergi la Order Box/In Box	Furnizează o comandă rapidă pentru același caz într-o altă casetă (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Informații caz	Revizuieste detaliile cazului și salvează-le în format PDF sau tipărește-le.
	Memo & etichete	Adaugă o notă sau etichete atunci când înregistrezi sau comanzi un caz. Folosește-le pentru a comunica partenerilor tăi orice informații suplimentare despre caz.
	Istoricul cazului	Furnizează informații detaliate despre istoricul cazului. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	Șterge	Șterge cazul. Nu poți șterge cazurile comandate sau cazurile care au fost create offline.
	Clonează	Creează un duplicat al cazului curent în Case Box. Toate datele vor fi copiate în cazul clonat. Această funcție ajută la replicarea informațiilor de tratament pentru același pacient sau la efectuarea unei comenzi suplimentare cu aceleași informații sau fișiere.
	Atașează	Atașează fișiere în diverse formate.
	Exportă	Exportă fișierele de scanare sau de rezultate CAD pe calculatorul local. Poți alege formatul de fișier preferat când exportezi fișierele. Fișierele exportate pot fi utilizate în software-ele CAD și CAM pentru lucrări ulterioare.
	Partajează	Creează un link pentru partajare. Utilizatorii cu linkul partajat pot accesa datele 3D într-un browser precum Chrome, Firefox sau Safari fără a instala programe suplimentare. Poți partaja linkul în mod liber cu oricine sau doar cu anumite persoane. Se poate seta un cod PIN sau o dată de expirare a legăturii pentru a securiza informațiile private.
	Trimite solicitare de asistență	Accesează o pagină a Centrului de ajutor Medit pentru a trimite o cerere de suport.

Order Box/In Box

1	Afișează numele cazului și numele pacientului.
2	Asigurarea funcțiilor de gestionare a comenzilor (acceptare/anulare; livrare/recepție).
3	Afișează fișele disponibile: Comandă, Vizualizare fișier.
4	Afișează funcții pentru gestionarea cazurilor și a fișierelor: starea cazului, comenzi rapide pentru informații detaliate, informații despre caz, memo & etichete etc.
5	Afișează informații detaliate pentru comandă, inclusiv numărul comenzii, numele pacientului, numele partenerului, data scanării, data comenzii, data livrării și memo & etichete.
6	Afișează informațiile despre produsul comandat și starea livrării.

File în Order Box/In Box

Comandă	Vizualizare fișier
Verifică informațiile detaliate legate de comandă, cum ar fi numărul comenzii, numele pacientului, numele contului, data scanării, data comenzii, data livrării, memo și etichete.	Vizualizează fișierele generate de operațiunile de scanare/CAD. Vizualizatorul de fișiere afișează și gestionează modelele 3D și imaginile 2D obținute sau atașate.

Case Talk

Cazurile create în Medit Link pot fi partajate cu anumiți oameni, oricine cu un link de partajare sau membri înregistrați ai Medit Link.

Utilizatorul poate vedea o listă a tuturor cazurilor partajate prin intermediul Case Talk în aplicația Medit Link App și Medit Link Web.



Serviciul Case Talk necesită o conexiune la internet.

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27, 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolahjeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

Cazurile partajate pot fi vizualizate prin intermediul unui browser web fără a instala un program separat, permițând o comunicare ușoară prin intermediul datelor 3D pe diferite dispozitive.

App Box

App Box oferă diverse programe adiționale care completează fluxul de lucru de bază al scanării și sporesc productivitatea. Poți descărca și instala aplicațiile furnizate pentru a crea aparate dentare, pentru a analiza datele de scanare, pentru a te ajuta în timpul unei consultații sau pentru a-ți eficientiza procesul de lucru.

Join the Medit Users Group on Facebook!
Connect with Experts, Learn Valuable Tips, and Elevate Your Skills
[Join Now](#)

Explore Medit Resources
News, tips, and expert insights on Digital Dentistry
[Visit Now](#)

Featured Apps

- Medit DCM Converter**: Convert 3Shape DCM files to Medit-compatible format. [Update](#)
- Medit Smile Design**: Simulation of teeth movement for orthodontic cases. [Installed](#)
- Medit Ortho Simulation**: Simulate the trajectory of teeth movement using Medit Ortho... [Install](#)
- Action Gate (ヨシダ - Yoshid...)**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)

Management

- DentWeb(덴트웹) Integration**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)
- EasyRx Integration**: Universal orthodontic LMS. [Install](#)
- Open Dental Integration**: Quality software for dental offices. [Install](#)
- iie systems connector**: PRIM specialized for orthodontics. [Install](#)
- OneClick Integration App**: Osstem's easy-to-use PMS. [Install](#)
- i-Pro Integration**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)
- LOGOSw Integration**: Add a link between LOGOSw and Medit Link. [Install](#)
- DentalCAD Integration**: Allow to integrate Medit Link with DentalCAD. [Install](#)
- Action Gate (ヨシダ - Yoshid...)**: Comprehensive dental PMS. [Install](#)
- Andcom Integration**: Convenient dental PMS. [Install](#)

Tot


În fila „Tot” este afișată lista tuturor aplicațiilor furnizate, inclusiv aplicațiile originale dezvoltate de Medit (Medit Apps) și aplicațiile partenere, care sunt aplicații de integrare cu partenerii Medit din diferite sectoare ale stomatologiei digitale, cum ar fi imprimarea 3D, software CAD/CAM etc.

Medit Apps

Fila „Medit Apps” este afișată doar lista aplicațiilor originale dezvoltate de Medit.

Descărcat

În fila „Descărcat” este afișată lista aplicațiilor instalate în prezent pe calculatorul tău și a aplicațiilor care au fost descărcate în trecut de către contul de utilizator.

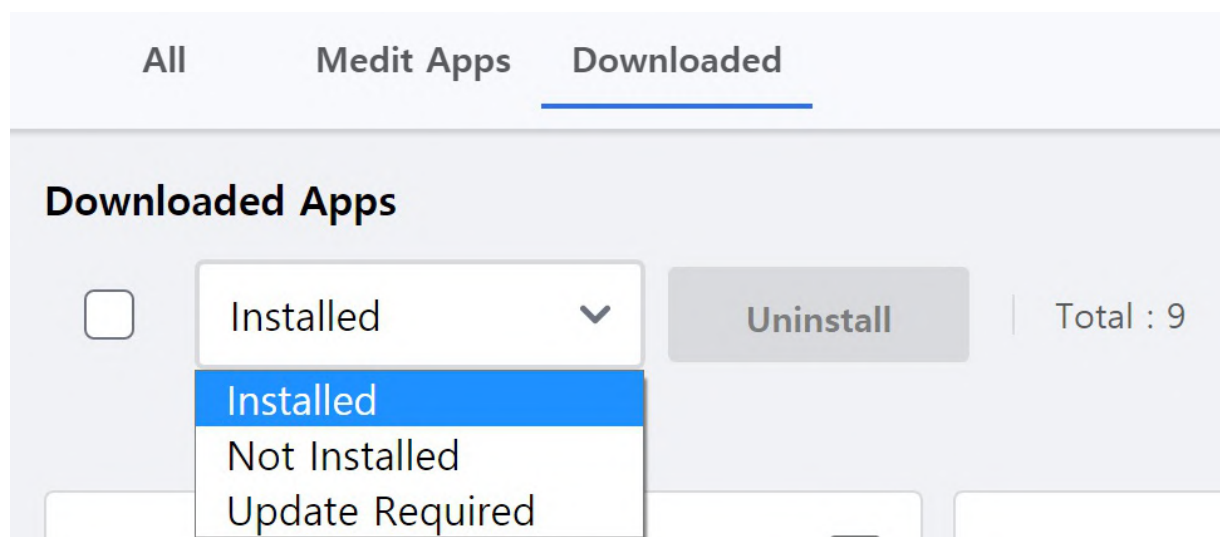

- **Instalat:** Opțiunea afișează numai aplicațiile care sunt instalate pe calculatorul la care utilizatorul este conectat în acel moment.
- **Nu este instalat:** Această opțiune îți permite să vezi aplicațiile pe care le-ai instalat pe alte calculatoare pentru a le putea instala rapid.
- **Actualizare necesară:** Această opțiune afișează numai aplicațiile instalate pe calculatorul curent care trebuie actualizate.

Trash Box

Trash Box stochează temporar cazurile șterse. Orice caz din Trash Box poate fi restaurat sau șters definitiv.

Atenție

Datele șterse din Trash Box vor fi șterse definitiv de pe calculator și de pe server și nu vor putea fi recuperate.

MEDIT Link3.2.0

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

wonhoon choi

Trash Box

Restore

Selected Cases: 0

All

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Manager sincronizare caz

Managerul sincronizare caz te ajută să încarci și să descarci cazuri în mod eficient. Poți încărca mai multe cazuri în cloud sau le poți descărca pe calculatorul tău local. Pentru a identifica cazurile care necesită sincronizare, pur și simplu caută-le sau aplică filtre de date.

Case Synchronization Manager

Upload

Download

All

Case Name

Case Name / Contains

Total Cases: 210

No Date

Data Type

All

Case Name	Patient Name	Scanned Date↓	Size	Status	
BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required	🗑
BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required	🗑
BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required	🗑
BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required	🗑
test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required	🗑
i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required	🗑
Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required	🗑
Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required	🗑
Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required	🗑
서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required	🗑
서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required	🗑

Close

Close

↑
Incarcă

 Upload	Încarcă cazurile selectate.
 Cancel	Anulează încărcarea pentru cazurile selectate.
 Retry	Reîncearcă încărcarea cazurilor dacă încărcarea eșuează.

Descarcă

 Download	Descarcă cazurile selectate.
 Cancel	Anulează descărcarea pentru cazurile selectate.
 Retry	Reîncearcă descărcarea cazurilor dacă descărcarea eșuează.

Site-uri web conexe

Poți accesa direct meniurile disponibile doar pe Medit Link Web, cum ar fi My Info, Partners și Membership. Consultă Medit Link > Medit Link Web > [Partners](#), [Membership](#) și [My Info](#) pentru descrieri detaliate a meniurilor Medit Link.

Poți accesa magazinul online al Medit, Medit Shop, unde poți achiziționa garanții extinse pentru scanere și alte produse Medit, cum ar fi rucsacurile pentru scanere.

De asemenea, poți obține diferite informații despre utilizarea Medit Link. Accesează resursele educaționale și informaționale Medit, precum Centrul de ajutor Medit, canalul de YouTube Medit Academy și platforma online educațională Medit Academy.



My Info



Partners



Membership



Shop



Help Center



YouTube



Academy

Vizualizare fișier

Vizualizatorul de fișiere grupează și afișează diverse date, inclusiv datele obținute de la programele conectate la Medit Link și datele atașate de către utilizatori.

Oferă funcții de gestionare de bază, cum ar fi afișarea/ascunderea datelor, ajustarea opacității și ștergerea datelor.

Acceptă previzualizări ale fișierelor în următoarele formate:

- Date 3D: STL, OBJ, PLY
- Imagini 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Fișiere video: MKV, MP4, AVI, WMV

Arbore de date

Poți să grupezi și să afișezi toate datele pentru caz în arborele de date. De asemenea, poți afișa/ascunde date, ajusta transparența și șterge date din arborele de date.


	Afișează / Ascunde	Poți afișa sau ascunde datele.
	Opacitate	Bara de diapozitive apare atunci când faci clic pe una dintre datele din arborele de date. Poți ajusta opacitatea datelor afișate prin deplasarea barei glisante.
	Mai Mult	Dacă faci clic pe pictograma Altele, se afișează caracteristicile suplimentare disponibile. • Afișează doar asta: Ascunde toate celelalte date, dar afișează numai datele corespunzătoare. • Ascunde: Ascunde datele. • Duplicat: Copiază datele și le adaugă la grupul de atașamente. • Exportă: Exportă fișierele selectate. • Redenumeste: Schimbă numele datelor. • Șterge: Șterge datele.



Aviz

Poți redenumi datele atunci când ești online.

Instrumente de control model

Controalele modelului 3D

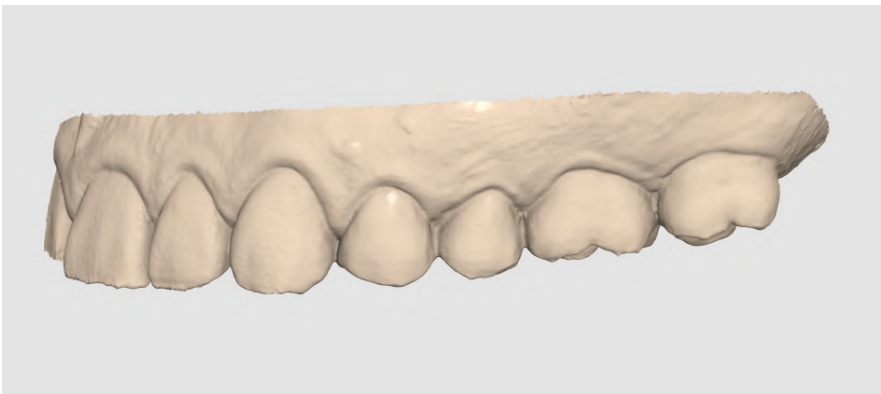+	Panoramic	Mută modelul.
↺	Rotește	Rotește modelul.
🔍	Mărește/Micșorează	Mărește sau micșorează imaginea modelului.
📏	Zoom ajustat	Poziționează modelul în centrul ecranului.
🌈	Mod de afișare a datelor	Afișează datele în culori cu finisaj lucios (redare PBR). 
🌈		Afișează datele în culori cu finisaj mat (randare Phong). 
●		Afișează datele într-o culoare. 

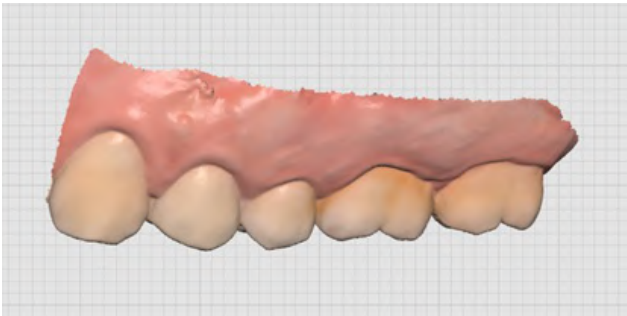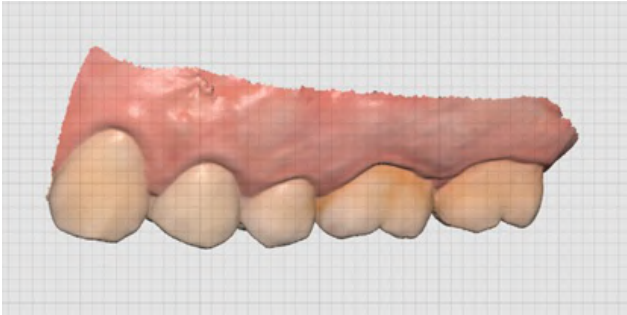	Setări grilă (mm)	Grilă pornită	Afișează grila în fundal. 
		Grilă oprită	Ascunde grila în fundal.
		Suprapunere pornită	Suprapune grila peste model. 

Control imagine 2D


 	Imaginea următoare/precedentă	Deplasează printre imagini.
	Editează	Editează imaginea.
 	Prinde/lipește fereastra	Poți detașa fereastra de imagine și o poți ajusta în poziția dorită. Poți redimensiona fereastra. Când fereastra este readusă la locația inițială, aceasta revine la dimensiunea sa implicită.

Instrumente funcții

Captura imaginii și Memo


Capturează ecranul curent ca imagine 2D, desenează pe el sau adaugă notițe.


Îl poți salva ca fișier cu notele tale și îl poți trimite ca referință.

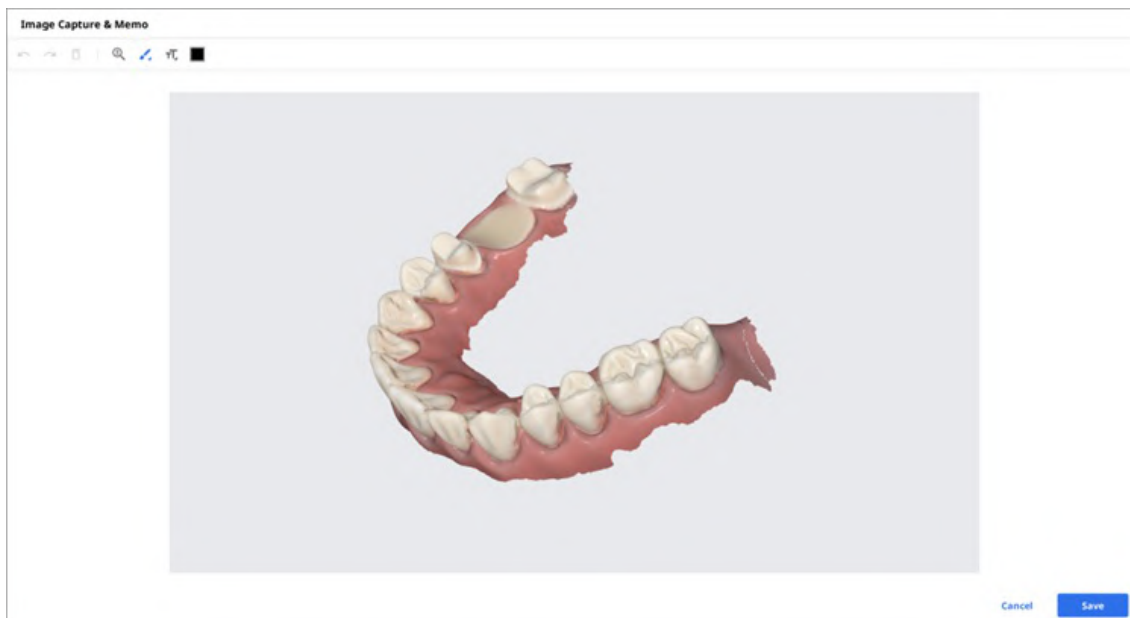

Captură orto


Captează imaginile în direcția curentă de vizualizare și sus/jos/stânga/dreapta din direcția curentă de vizualizare.

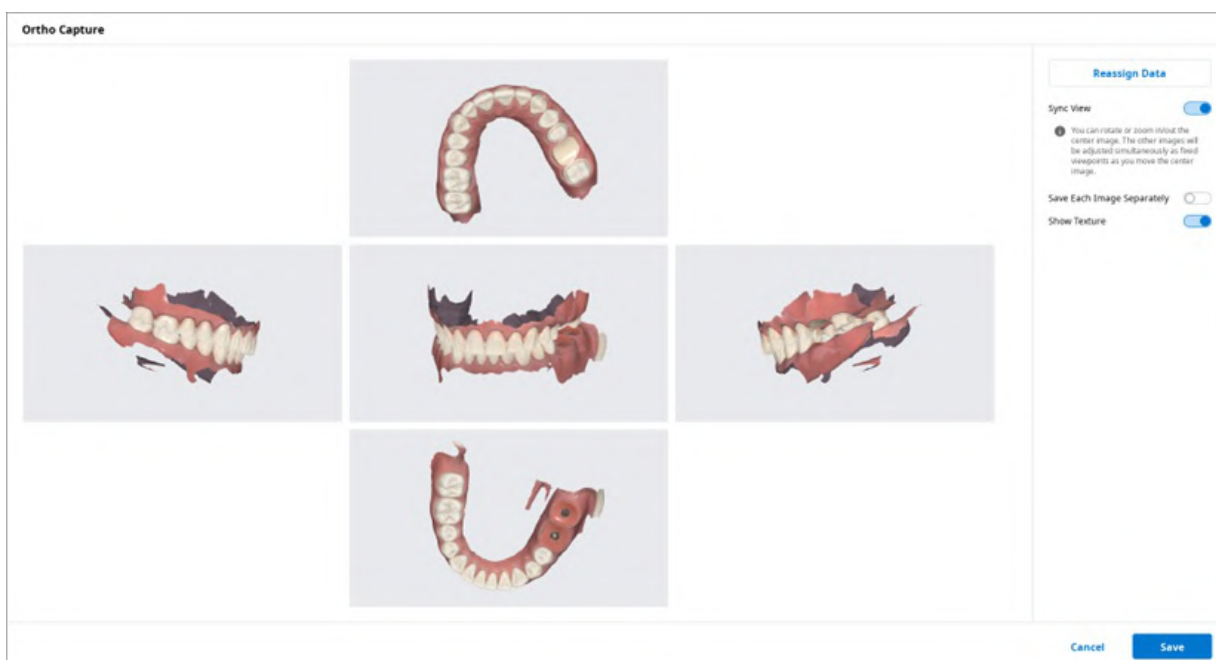

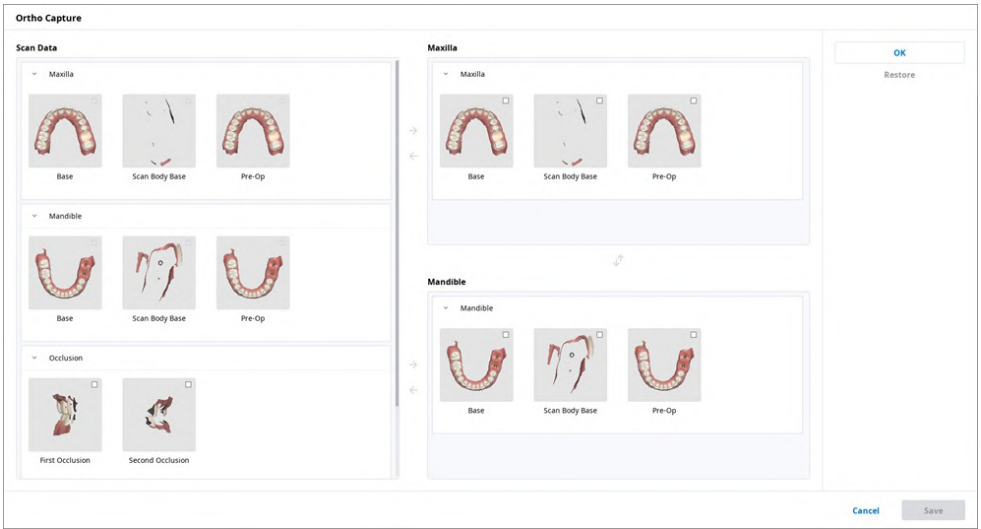Sincronizează vizualizarea	Când este activată, poți roti sau mări/micșora imaginea centrală. Celelalte imagini vor fi ajustate simultan ca puncte de vedere fixe pe măsură ce muți imaginea centrală. Atunci când este dezactivat, poți face panoramare, roti sau mări/micșora toate imaginile în mod individual.
Salvează fiecare imagine separat	Salvează fiecare imagine la rezoluție înaltă.
Afișează textura	Pornește/oprește textura pentru model.
Reatribuie date	Schimbă datele pentru maxilar/mandibulă cu ajutorul funcției Reatribuie date. Poți folosi datele modificate pentru a crea și utiliza imaginile rezultate din Captură Orto.  • Date de scanare: Sunt afișate toate datele de scanare pentru caz. • Maxilar: Sunt afișate datele pe care le-ai selectat pentru maxilar. • Mandibulă: Sunt afișate datele pe care le-ai selectat pentru mandibulă.


Umple găuri

Umple găurile din datele de plasă 3D.

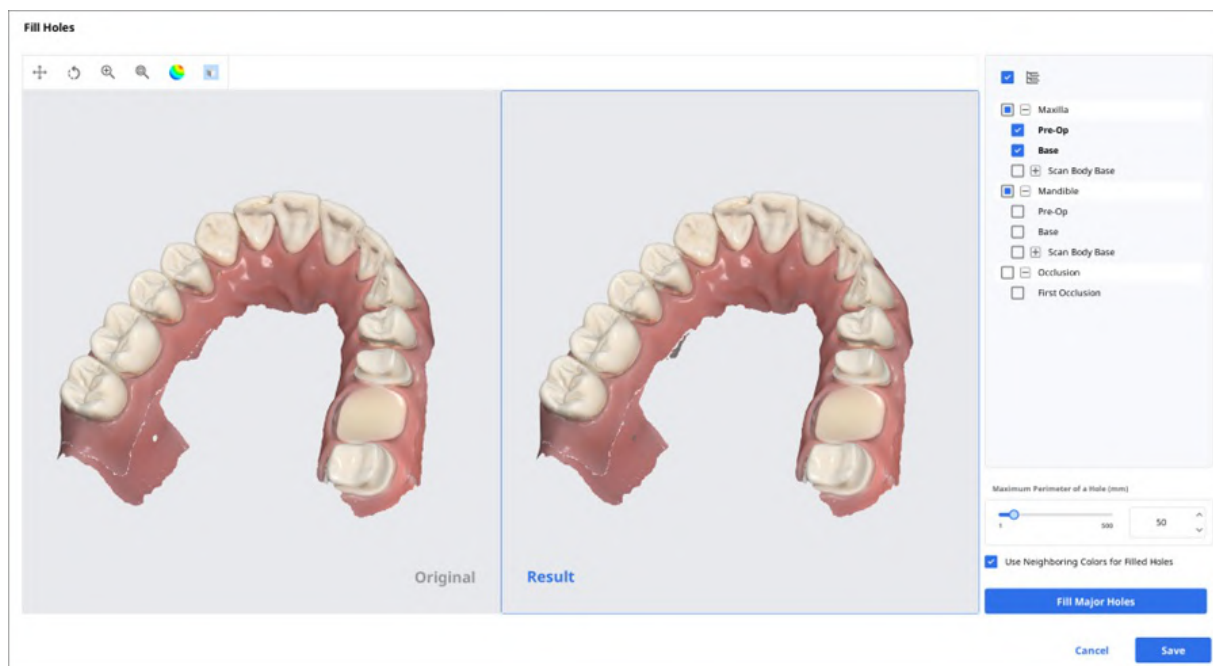

Decupare


Decuparea oferă diverse instrumente de editare a datelor.

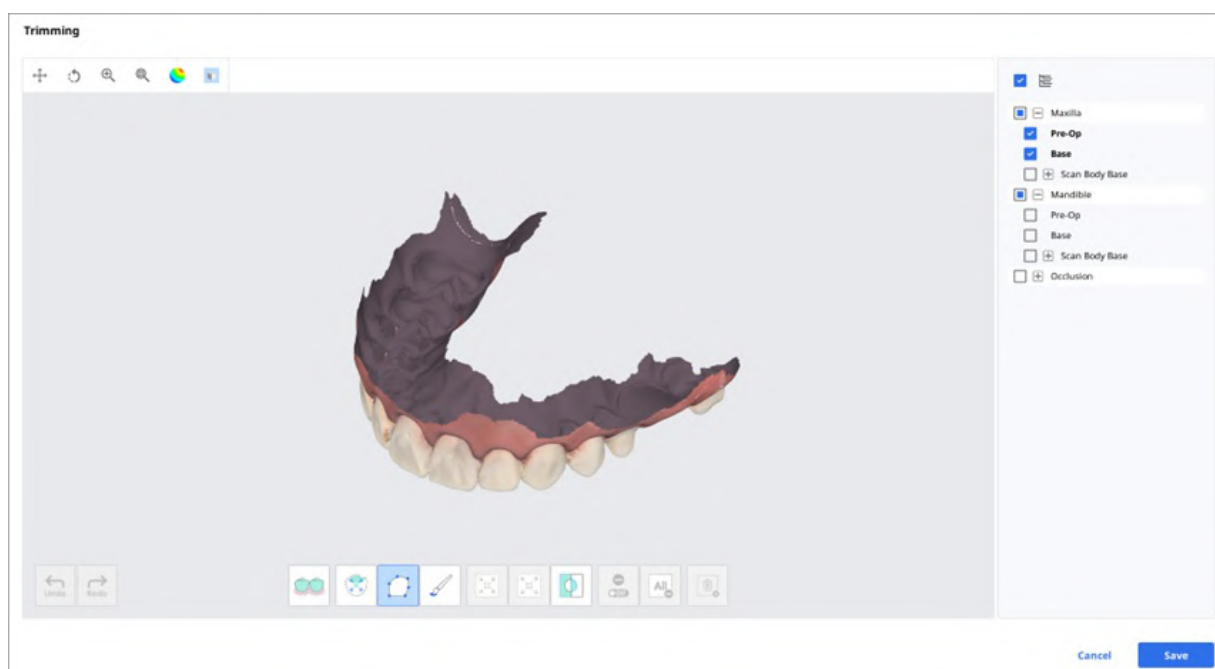

Datele de rețea 3D selectate pot fi editate cu ajutorul diferitelor instrumente situate în partea de jos a ferestrei.

Selecție		Selecție inteligentă a dinților	Selectează automat toți dinții de pe arcadă lăsând gingia la o parte.  Aviz Această funcție este disponibilă doar pentru date de scanare obținute utilizând Medit Scan for Clinics cu opțiunea „Utilizează GPU” pornită.
		Selecție inteligentă a dintelui	Selectează automat zona unui singur dinte cu un singur clic. Poți face clic și trage pe dinte.
		Selectare polilinie	Selectează toate entitățile din interiorul unei forme poliliniale desenate pe ecran.
		Selectare pensulă	Selectează toate entitățile de pe o traiectorie desenată cu mâna liberă pe ecran. Doar fața frontală va fi selectată. Pensula vine în trei mărimi diferite.
Ajustarea zonei selectate		Micșorează zona selectată	Reduce zona selectată de fiecare dată când apeși butonul.
		Extinde zona selectată	Extinde zona selectată de fiecare dată când apeși butonul.
		Inversează zona selectată	Inversează selecția.
Deselectare		Selecție/Deselectie	Când este activată, deselectează zona cu ajutorul diferitelor instrumente.
		Șterge toată selecția	Șterge toate zonele selectate.
		Șterge zona selectată	Șterge datele din zona selectată.

1. Selectează zona pe care vrei să o decupei cu ajutorul instrumentelor de selecție a zonei.

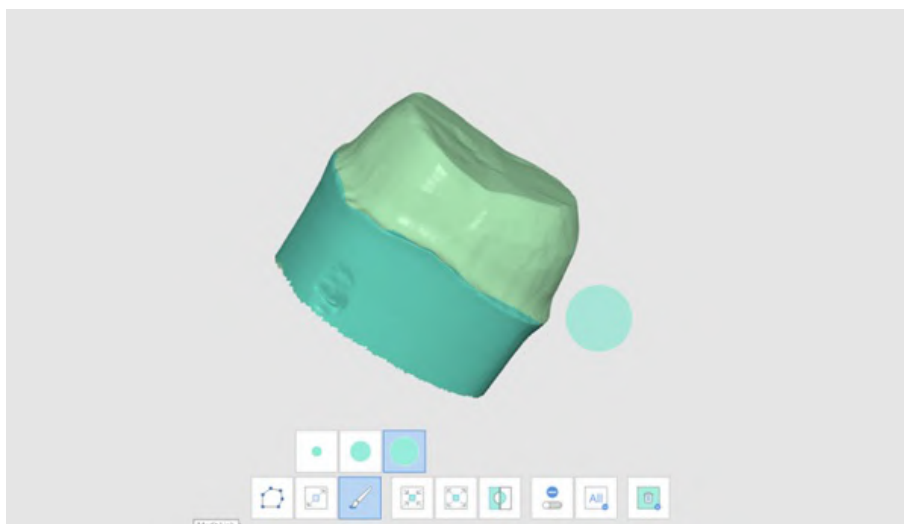


Aviz


Instrumentul de decupare polilinie selectează toate entitățile dintr-o formă polilinie desenată pe ecran, în timp ce instrumentul de decupare cu pensulă selectează numai datele feței frontale.

2. Poți inversa, micșora sau extinde selecția cu următoarele 3 instrumente.


- Inversează zona selectată

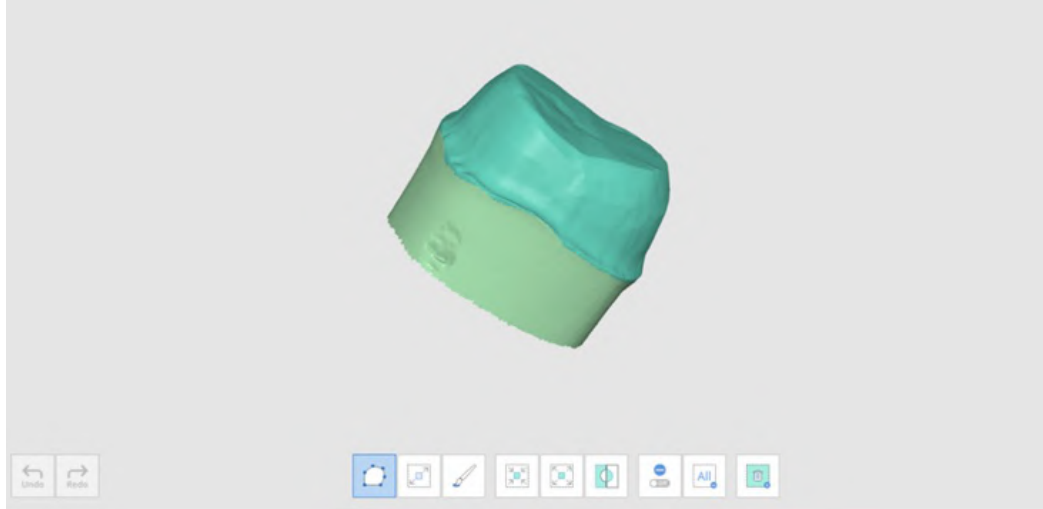

- Micșorează zona selectată

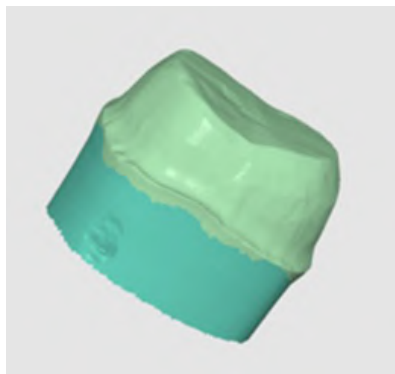

- Extinde zona selectată

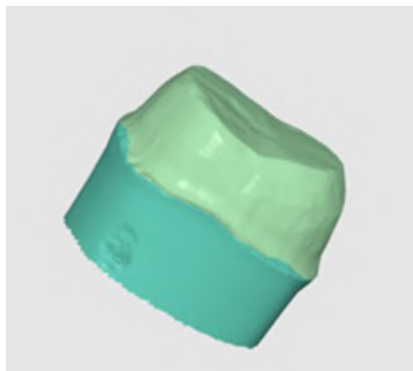






3. Poți deselecta zonele selectate cu ajutorul instrumentului Șterge zona selectată.

Optimizează alinierea ocluziei

Optimizează alinierea ocluziei. Poți alege datele țintă și ajusta alinierea ocluziei.




Nivel compensație

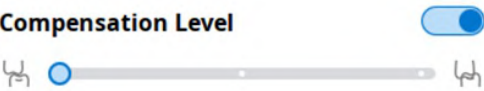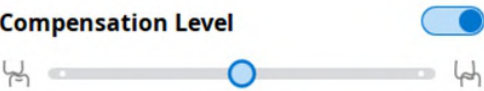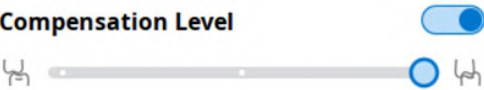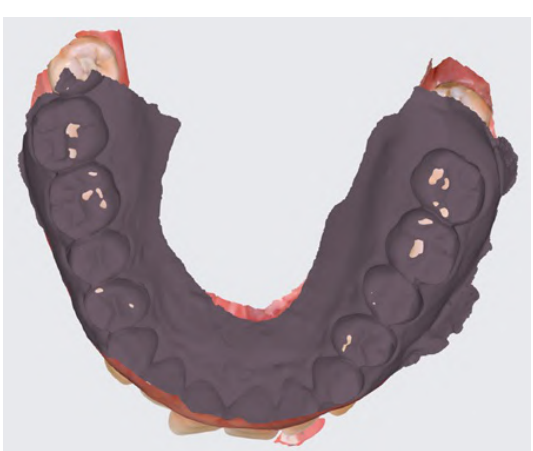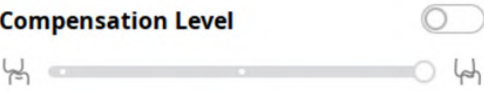Scăzut	Compensation Level 	
Mediu	Compensation Level 	
Ridicat	Compensation Level 	
Dezactivat	Compensation Level 	

Mișcarea mandibulară

Poți reda mișcările mandibulare înregistrate în Medit Scan for Clinics pentru a vedea contactele ocluzale dinamice dintre dentiția superioară și cea inferioară.

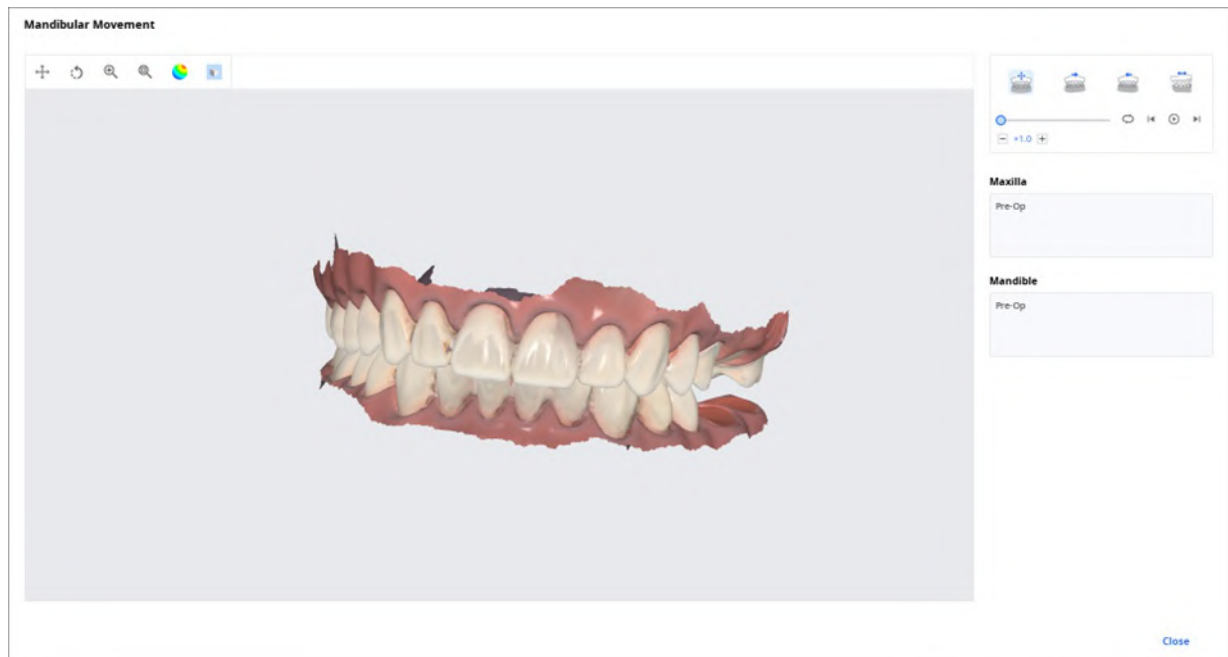

	Mișcare liberă	Redă înregistrarea cu mișcarea liberă a mandibulei.
	Mișcarea laterală stângă	Redă înregistrarea în care mandibula se deplasează spre stânga.
	Mișcarea laterală dreaptă	Redă înregistrarea în care mandibula se deplasează spre dreapta.
	Mișcare protuberantă	Redă înregistrarea cu mandibula care se mișcă înainte.

Gestionează datele Ocluzie multiplă în Vizualizare fișier

Poți obține mai multe rezultate ale datelor de ocluzie din aplicația Medit Scan.

Medit Link oferă funcția de gestionare a rezultatelor prin intermediul „Vizualizare fișier”.

Cum se gestionează mai multe rezultate


Atunci când utilizatorul primește mai multe rezultate de ocluzie de la Medit Scan for Clinics, Medit Link oferă opțiunea de a selecta un rezultat.

Lista de rezultate este listată după nume și poți selecta un element.

Modelul selectat va fi afișat în „Arbore de date” și în „Zona de afișare a modelului”.



Poți să reduci lista și să schimbi elementul cu ajutorul pictogramelor săgeată.

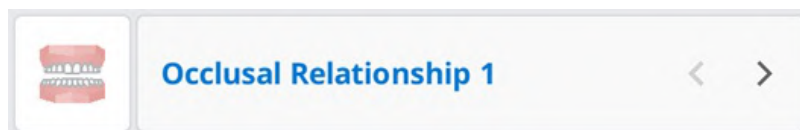

Vizualizează opțiuni

Poți schimba Vizualizează opțiuni pentru a personaliza aspectul listei de cazuri din Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

	Status Filters	2 in use >
	Table Items	8 in use >
	View Type	List View >
	Grouping	None >
	Sorting	Last Modified Date >

Statut filtre

Afișează sau ascunde fiecare filtru care reprezintă starea cazului. Filtrele de stare ascunse nu sunt afișate pe ecran în Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Poți găsi cu ușurință cazul de care ai nevoie cu ajutorul filtrelor de stare.

- Poți face clic pe starea pe care dorești să o vizualizezi pentru a afișa numai cazurile aflate în starea respectivă.
- Poți selecta mai multe stări deodată.

Pentru fiecare box, sunt disponibile următoarele opțiuni de filtrare:

Box	Statut filtre
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Tabel articole

Selectează elementele care urmează să fie afișate în lista de cazuri din Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Poți modifica ordinea elementelor tabelului sau ajusta lățimea coloanelor tabelului în vizualizarea listei pentru a optimiza cât mai bine mediul utilizatorului.

Pentru fiecare box, sunt disponibile următoarele elemente de tabel:

Box	Tabel articole
Patient	Nume pacient / ID pacient / Gen / Număr de cazuri / Data înregistrării / Data nașterii / Ultima dată de scanare
Case Box	Status / Nume caz / Data nașterii / Informații formular / Ultima modificare / Data de scanare / Data comenzii / Nume Laborator
Order Box	Status / Nume caz / Nume pacient / Data de scanare / Data comenzii / Nume Laborator / Data de livrare solicitată / Ultima modificare
In Box	Status / Nume caz / Data comenzii / Data de livrare solicitată / Ultima modificare / Nume clinică
Work Box	Status / Nume caz / Nume pacient / Informații formular / Ultima modificare / Data de livrare solicitată / Data scanării / Nume clinică / Data comenzii

Vezi tip

Schimbă tipul de vizualizare între Vizualizare galerie și Vizualizare listă în Case Box.

Pentru fiecare box, sunt disponibile următoarele opțiuni de tip de vizualizare:

Box	Opțiuni Vezi tip
Patient	Vizualizare listă
Case Box	Vizualizare listă / Vizualizare galerie
Order Box	Vizualizare listă
In Box	Vizualizare listă
Work Box	Vizualizare listă

Grupare

Selectează o opțiune de grupare pentru a clasifica și rearanja cazurile din listă în funcție de opțiunea selectată.

Pentru fiecare casetă, sunt disponibile următoarele opțiuni de grupare:

Box	Opțiuni de grupare
Case Box	Niciunul / Nume pacient / Data scanării / Data comenzii
Order Box	Nici unul / Data scanării / Data comenzii / Data de livrare solicitată
In Box	Nici unul / Data comenzii / Data de livrare solicitată
Work Box	Nici unul / Data de livrare solicitată



Opțiunile de grupare nu sunt disponibile în Patient, Case Talk și Trash Box.

Sortare

Selectează o opțiune de sortare pentru a modifica ordinea cazurilor din listă în funcție de opțiunea selectată.

Pentru fiecare casetă, sunt disponibile următoarele opțiuni de sortare:

Box	Grupare	Opțiuni de sortare
Patient	-	Nume pacient / ID Pacient / Data nașterii / Data înregistrării / Număr de cazuri / Ultima dată de scanare
Case Box	Niciunul	Nume pacient / Ultima modificare / Data scanării / Data comenzii / Nume Laborator
	Numele pacientului	Ultima modificare / Data scanării / Data comenzii / Nume Laborator
	Data scanării	Nume pacient / Data ultimei modificări / Data comenzii / Nume laborator
	Data comenzii	Nume pacient / Ultima modificare / Data scanării / Nume Laborator
Order Box	Niciunul	Nume pacient / data scanării / Data comenzii / Data de livrare solicitată / Nume Laborator
	Data scanării	Nume pacient / Data comenzii / Data de livrare solicitată / Nume laborator
	Data comenzii	Nume pacient / Data scanării / Data de livrare solicitată / Nume Laborator
	Data de livrare solicitată	Nume pacient / Data scanării / Data comenzii / Nume Laborator
In Box	Niciunul	Nume pacient / Data comenzii / Data de livrare solicitată / Numele clinicii
	Data comenzii	Nume pacient / Data scanării / Data de livrare solicitată / Nume clinică
	Data de livrare solicitată	Nume pacient / Data comenzii / Nume clinică
Work Box	Niciunul	Nume pacient / Data ultimei modificări / Data de livrare solicitată / Nume clinică
	Data de livrare solicitată	Nume pacient / Data ultimei modificări / Nume clinică




Aviz

Opțiunile de sortare nu sunt disponibile în Case Talk și Trash Box.

Filtrare și Caută


Filtrează după pacient

Filtrează și afișează cazurile în funcție de numele pacientului. Poți crea o listă filtrând doar pacienții la care trebuie să lucrezi.

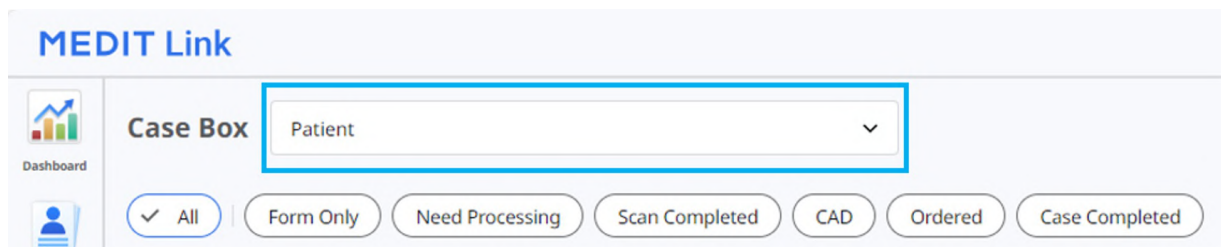

The screenshot shows the 'MEDIT Link' interface. On the left is a sidebar with a 'Dashboard' icon and a user profile icon. The main area has a 'Case Box' section with a dropdown menu currently showing 'Patient'. Below this are several filter buttons: 'All' (with a checkmark), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Introdu un nume de pacient.

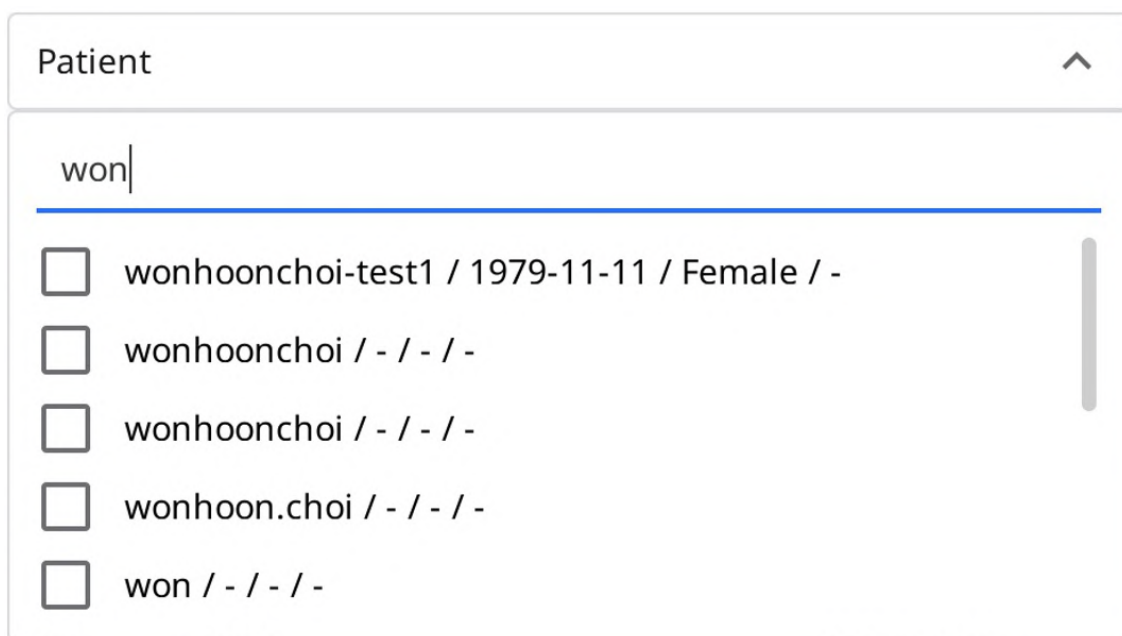

This screenshot shows the expanded search dropdown for the 'Patient' filter. The input field at the top contains the text 'won'. Below the input field is a list of five search results, each preceded by an unchecked checkbox. The results are: 'wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -', 'wonhoonchoi / - / - / -', 'wonhoonchoi / - / - / -', 'wonhoon.choi / - / - / -', and 'won / - / - / -'. A vertical scrollbar is visible on the right side of the list.

2. Selectează pacienții din rezultatele căutării de mai jos.

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2 ^

won|

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
 ☐ wonhoonchoi / - / - / -
 ☐ won / - / - / -
 ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
 ☐ won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

☒ wonhoonchoi / - / - / -
 ☒ wonhoon.choi / - / - / -
 ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. În listă sunt afișate numai cazurile pacienților selectați.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - + 2

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases: 20 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalCase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Filtrează după dată

Filtrează și afișează cazurile modificate ultima dată în intervalul de timp stabilit.

1. Clic pe filtrul de durată.

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Selectează durata din listă.

- Toate: Afișează toate cazurile.
- Interval personalizat: Specifică datele de început și de sfârșit pentru a afișa cazurile modificate ultima dată în perioada respectivă.
- Astăzi: Afișează cazurile modificate ultima dată astăzi.
- Ieri: Afișează cazurile modificate ultima dată ieri.
- Ultimele 7 zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 7 zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Ultimele 30 de zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 30 de zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Luna aceasta: Afișează cazurile modificate ultima dată în cursul acestei luni.
- Luna precedentă: Afișează cazurile modificate în ultima lună.

Lista de cazuri va fi actualizată în timp real cu cazurile create sau modificate ultima dată în intervalul de timp selectat.

Capacități de căutare avansată

Utilizează capacitățile de căutare pentru a găsi rapid informațiile pe care le dorești.

All

▼

Search / Contains

🔍

Următoarele criterii de căutare sunt disponibile pentru fiecare casetă:

Patient	Tot, Nume pacient, ID Pacient
Case Box	Toate, Nume caz, Nume pacient, ID pacient, Informații formular, Nume laborator
Order Box	Toate, Nume caz, Nume pacient, ID pacient, Nume laborator, ID comandă
In Box	Toate, Nume caz, Nume pacient, Nume clinică, ID comandă
Work Box	Toate, Nume caz, Nume pacient, Informații formular, Nume clinică, ID comandă
Case Talk	Nume Case Talk (conține), Nume pacient (egal cu)
Trash Box (Clinică)	Toate, Nume caz, Nume pacient, Nume laborator, Șterse de către
Trash Box (Laborator)	Toate, Nume caz, Nume pacient, Nume clinică, Șters de către

Poți selecta Criterii de căutare și alege între logica Conține și Echivalent.

All

▼

All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains

☐ Equals

Creează/Editează/Clonează/Șterge caz

Crearea de cazuri

Creează un caz în Case Box (Clinică)

1. Clic pe butonul „Caz nou” din colțul din dreapta sus.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Introdu informații de bază, cum ar fi numele pacientului și numele cazului.

- Dacă introduci un nume care nu se află pe lista de pacienți, se va adăuga un nou pacient.
- Dacă introduci un nume care se află în lista de pacienți, îl poți selecta din listă.
- Dacă înregistrezi un caz pentru un pacient existent, fă clic pe pictograma Lista de pacienți pentru a selecta un pacient existent.



- În caseta de dialog Lista de pacienți, poți înregistra un nou pacient sau poți edita informațiile unui pacient existent.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-09-28	2020-09-28	
☐	test				0	2020-09-28	2020-09-28	
☐	test				13	2020-09-23	2020-09-28	
☒	test				85	2020-09-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-09-18		
☐	13				0	2020-09-20		
☐	14				0	2020-09-20		
☐	15				0	2020-09-20		

Close Select

3. Numele cazului va fi completat automat, dar îl poți modifica.
4. Clic pe „Înregistrează-te & Scanează” pentru a finaliza înregistrarea cazului și a trece la scanare.
 - **Înregistrare:** Vei fi redirecționat către pagina principală. Acest lucru este util atunci când se înregistrează mai multe cazuri.

- **Înregistrează-te & Scanează:** Treci la fila Formular pentru a înregistra informații despre formular pentru caz.

Crearea unui caz în Work Box (Laborator)

1. Clic pe butonul „Caz nou” din colțul din dreapta sus.

The screenshot shows a form titled "New Case Information". It contains the following fields and elements:

- Clinic Name***: A dropdown menu with a downward arrow icon.
- Patient Name***: A text input field.
- Case Name***: A text input field.
- Requested Delivery Date**: A date picker showing "2023-04-13".
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a small circular icon on the left.
- At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" (blue text) and "Register" (grey button).

2. Introdu sau selectează numele clinicii.
3. Introdu numele pacientului și numele cazului. Numele cazului va fi completat automat, dar îl poți modifica.
4. Introdu data preconizată de livrare având în vedere data de finalizare a lucrărilor.
5. După înregistrarea cazului, vei fi redirecționat către pagina principală.

Editare cazuri

Editare cazuri în Case Box (Clinică)

1. Clic pe pictograma „Editează” de lângă numele cazului.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibluar movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Clic pe pictograma „Caută” pentru a schimba numele pacientului. Reține că acesta nu poate fi editat direct; în schimb, poți găsi un nume de pacient cu care dorești să îl înlocuiești pe cel actual și poți edita informațiile despre pacient din listă.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoen Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Bifează numele pacientului cu care vrei să îl înlocuiești pe cel actual.
4. Pentru a crea un nou pacient, apasă butonul „Pacient nou”.
5. Utilizează butonul „Editare” pentru a modifica informațiile înregistrate despre pacient.
6. Clic pe „Aplică” pentru a finaliza procesul.

Editează cazuri în Work Box (Laborator)

1. Clic pe pictograma „Editează” de lângă numele cazului.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Clic pe „Aplică” după ce ai terminat editarea.



Nu poți edita informațiile despre cazurile primite prin intermediul comenzii în In Box.

Clonarea cazurilor

Clonarea cazurilor în Case Box (Clinică)

1. Clic pe pictograma „Clonează” din partea de sus.



2. Vei fi întrebat ce fel de informații dorești să clonezi în noul caz.

Information

i Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Alege dacă vrei să reproduci doar informațiile din formular sau toate datele.
4. Când clonarea este finalizată, se va crea un caz numit „[Nume caz] - Clonă”.

Clonarea cazului în Work Box (Laborator)

1. Clic pe pictograma „Clonează” din partea de sus.



2. Duplicarea tuturor datelor pentru a crea un nou caz.
3. Când clonarea este finalizată, se va crea un caz numit „[Nume caz] - Clonă”.


Ștergerea cazurilor

Șterge caz (clinică și laborator)

1. Clic pe pictograma „Șterge”.



2. Clic pe „OK” pentru a șterge cazul.

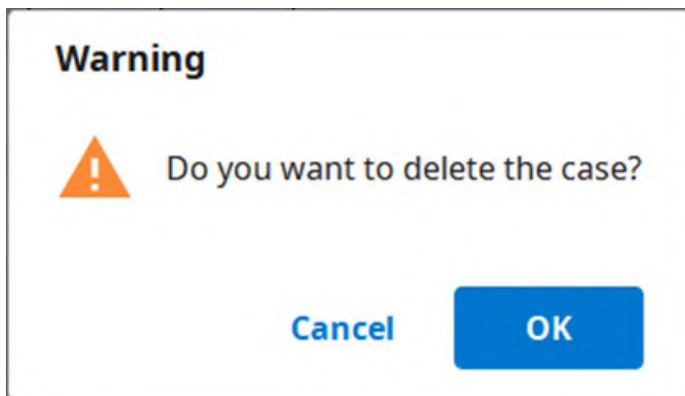

3. Cazurile șterse sunt mutate în coșul de gunoi și pot fi recuperate dacă este necesar.

Informații formular

Poți introduce informațiile din formular în funcție de programul conectat și de tipul de tratament.

Informațiile pe care le introduci vor fi folosite ca informații de bază pentru a lucra cu programe de scanare sau CAD și pentru a comanda.

Înregistrarea Informațiilor formular în Case Box

Introdu în fila Formular

1. Selectează dacă dorești să introduci informații despre tratament pe dinți sau pe arcadă.
2. Selectează tipul - Metoda - Materialul - Nuanță.
 - Dacă ai introdus informații incorecte, trebuie să te întorci pentru a le selecta din nou.
 - Informațiile selectate sunt înregistrate automat în lista de comenzi.
3. Clic „Salvează” pentru a-ți salva înregistrarea.

Înregistrarea Informațiilor formular în Work Box

Introdu în fila Formular


1. Selectează programul de scanare pe care vrei să-l utilizezi.
2. Selectează una dintre următoarele opțiuni care va defini strategia de scanare: Dinți/Matriță multiplă flexibilă/Matriță multiplă.
3. Metodele pot fi diferite în funcție de programul de scanare selectat.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Dinți	☐	☐
Arcadă	☐	☐
Matriță multiplă flexibilă	☒	☐
Matriță multiplă	☒	☐

4. Selectează numere de dinți, arcade sau matrițe pentru procesul de scanare.
5. Selectează tipul - Metoda - Materialul - Nuanță.
 - Dacă ai introdus informații incorecte, trebuie să te întorci pentru a le selecta din nou.
 - Informațiile selectate sunt înregistrate automat în listă.
6. Clic „Salvează” pentru a-ți salva înregistrarea.

Conectarea dinților în punte

Poți conecta mai mulți dinți într-o punte atunci când același material este aplicat pe mai mulți dinți adiacenți. Clic pe pictograma punte de lângă dinții selectați pentru a-i conecta sau deconecta.

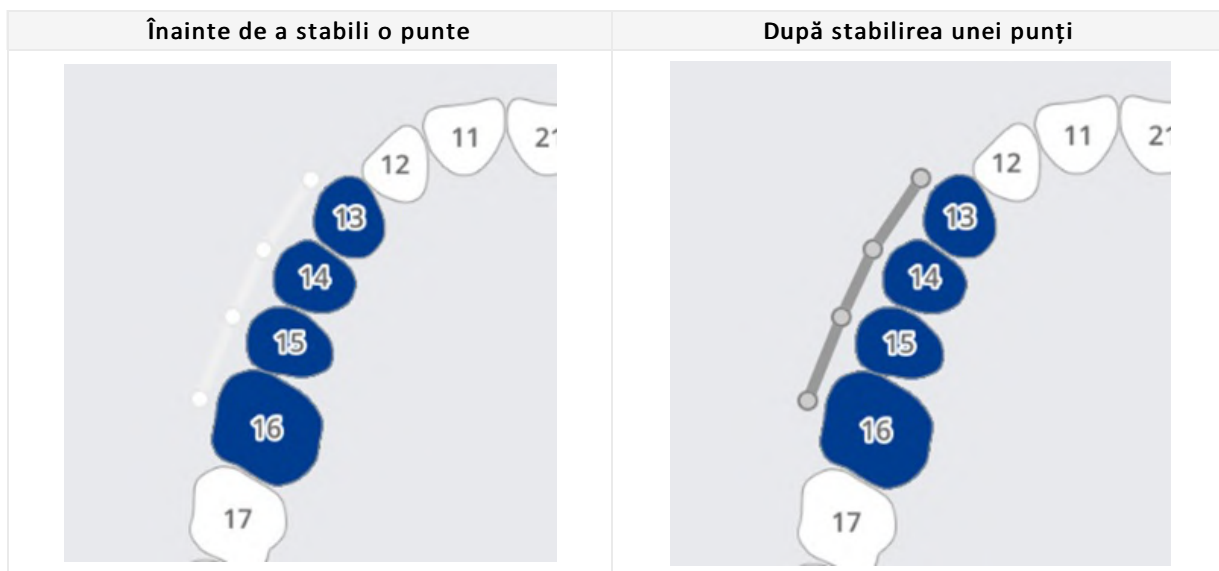

Setarea opțiunilor de scanare

În funcție de programul cu care lucrezi, sunt oferite diferite opțiuni de scanare.

Opțiunile de scanare selectate sunt transmise fiecărui program de scanare.

Medit Scan for Labs

Opțiuni generale

	Dinți adiacenți	Marchează dinții preparați și adiacenți și trimite informația către programul de scanat.
	Antagonist	Marchează automat antagonistul și oferă informațiile programului de scanare.
	Articulator	Afișează opțiunile de selectare ale articulatorului în programul de scanare.
	Marcator de mișcare	Permite utilizarea strategiei de scanare „Mișcarea fălcilor” în programul de scanare.

Opțiuni în funcție de dinți

	Corp de scanare	Permite stabilirea unei strategii de scanare a corpurilor de scanare în programul de scanare.
	Scanare pre-operatorie	Permite stabilirea unei strategii de scanare a unui model pre-operator în programul de scanare.
	Scanare ceruită	Permite setarea unei strategii de scanare a cerii în programul de scanare.

Adăugare la favorite

Poți selecta rapid un produs înregistrându-l ca favorit.

Lista de favorite înregistrate este gestionată ca un șablon și poate fi partajată prin intermediul funcțiilor de export și import.

Adaugă la favorite

1. Selectează numărul dintelui.
2. Selectează tipul - Metoda - Materialul - Nuanță.
 - Tip - Metodă - Material - Nuanțele pot fi înregistrate ca favorite chiar dacă nu sunt selectate toate.
3. Clic pe pictograma „Stea”.



4. O combinație a parametrilor selectați, cu excepția numărului de dinți, se află pe lista de căutare preferată.

Gestionează șabloanele favorite

Poți înregistra, gestiona și partaja diferite tipuri de șabloane.

Adaugă	Adaugă un șablon nou.
Redenumeste	Redenumeste șablonul curent.
Șterge	Șterge șablonul curent.
Exportă	Exportă șablonul curent într-un fișier.
Importă	Importă un fișier șablon.

Lucrează la scanare/CAD

Proces de scanare

Pe baza informațiilor introduse, continuă cu scanarea.

1. Introdu/salvează informațiile despre tratament și selectează opțiunile de scanare necesare.
2. Clic pe butonul „Scanează” din colțul din dreapta sus al ferestrei.

Proces CAD


Medit Link pune la dispoziție aplicația de integrare DentalCAD pentru a conecta Medit Link cu DentalCAD.

1. Instalează aplicația DentalCAD Integration în App Box.
2. Accesează detaliile cazului și clic pe pictograma aplicației DentalCAD Integration din Lansare rapidă.
3. Precizează traiectoria de acces la aplicația DentalCAD instalată pe calculatorul tău în fereastra de dialog pop-up.
4. Introdu detaliile cazului scanat și clic pe pictograma aplicației DentalCAD Integration, care va afișa o fereastră de dialog pentru a crea un fișier dentalProject.
5. Înregistrează informațiile din formular pentru DentalCAD și clic pe „Deschide” pentru a deschide programul CAD.
6. Dacă instalezi aplicația DentalDB Integration, rezultatele CAD vor fi livrate automat în calea de salvare specificată în exocad. (doar pentru conturile de laborator)


Utilizează aplicații add-in

Supliment Lansare rapidă

Poți rula direct diverse aplicații add-in făcând clic pe pictogramele aplicațiilor instalate în Lansare rapidă. Poți schimba ordinea pictogramelor aplicațiilor trăgându-le.

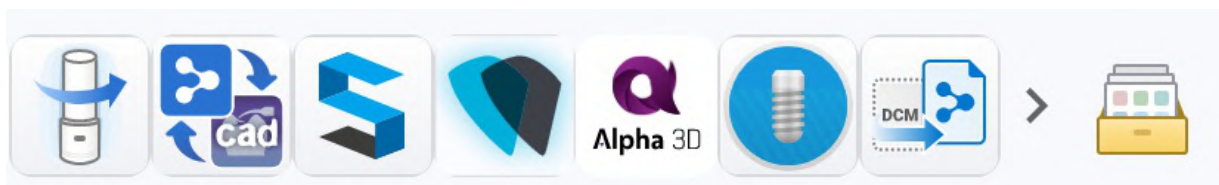

Administrarea lansatorului de aplicație

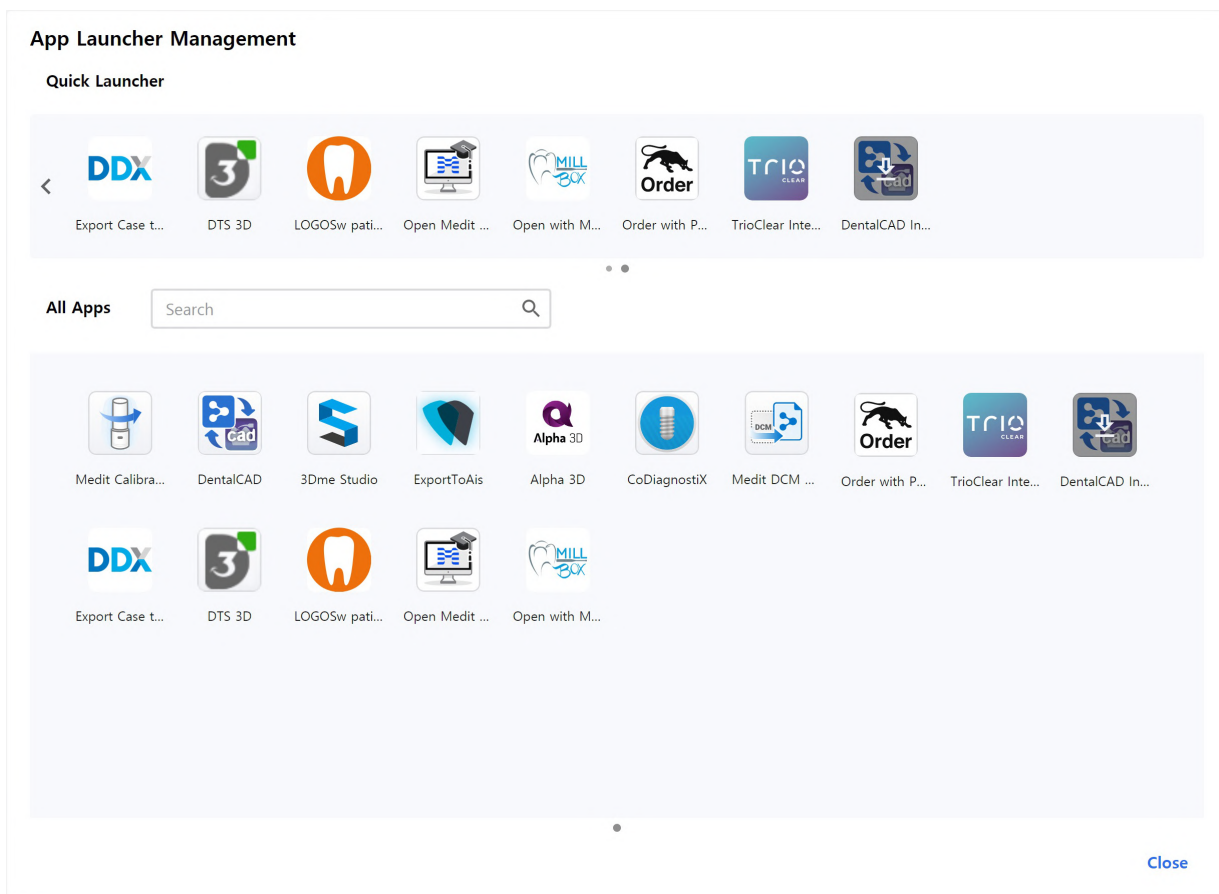

Lansare rapidă

Poți defini aplicațiile care apar în Lansare rapidă. Poți schimba ordinea pictogramelor aplicațiilor prin glisarea lor sau poți crea dosare pentru a grupa aplicații similare pentru a le organiza.

Toate aplicațiile

Sunt afișate toate aplicațiile pe care le-ai instalat. Poți face clic cu butonul drept al mouse-ului pe pictograma unei aplicații pentru a adăuga aplicația respectivă la Lansare rapidă. Din meniul contextual al clicului din dreapta, poți selecta, de asemenea, să rulezi, să instalezi sau să dezinstalezi aplicația.

Obține fișierele de rezultate

Exportă fișierele de rezultate ale scanării

În plus față de partajarea rezultatelor cu partenerii prin intermediul comenzilor, Medit Link îți permite să stochezi fișierele de rezultate în formatul de fișier dorit, utilizând funcția de export.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

[Preview](#)

Close


Export

121

Exportă fișiere în	Specifică calea în care vrei să stocjezi fișierele rezultate.
Numele folder-ului	Sistemul creează un dosar nou și stochează toate fișierele rezultate în el. Numele implicit al dosarului este stabilit prin regula de denumire. Dar poți schimba direct numele dosarului. Poți defini regula de denumire pe Setări > Opțiuni de export > Reguli pentru numele dosarului.
Nume fișier	Stabilește numele de fișier pentru rezultat. Regula de denumire stabilește numele implicit al fișierului. Dar poți schimba direct numele fișierului. Poți defini regula de denumire prin Setări > Opțiuni de export > Reguli pentru numele fișierului
Tip	Alege programul de proiectare pe care dorești să îl folosești. Medit Link va ajusta automat fișierele în funcție de selecția ta, permițându-ți să continui cu proiectarea fără a fi nevoie de o aliniere suplimentară a axelor.
Format rețea	Specifică formatul fișierului de plasă.
Format imagine	Specifică formatul fișierelor de imagine exportate.
Comprimă fișiere	Comprimă toate rezultatele într-un singur fișier.
Combină rețelele individuale	Combină rezultatul maxilarului sau mandibulei cu cel al dintelui individual. Este util atunci când nu este posibilă importarea mai multor fișiere într-un program.
Exportă toate relațiile ocluzale	Atunci când sunt generate mai multe rezultate ocluzale din aplicația de scanare, poți exporta toate rezultatele ocluzale deodată.
Salvează informațiile cazului ca PDF	Salvează informațiile despre caz în format PDF cu rezultatul.

Exportă fișierele rezultate din Lista cazurilor

Poți exporta fișiere de rezultate ale unui caz sau ale mai multor cazuri simultan cu ajutorul opțiunii „Exportă” de deasupra listei de cazuri din Case Box și Work Box.

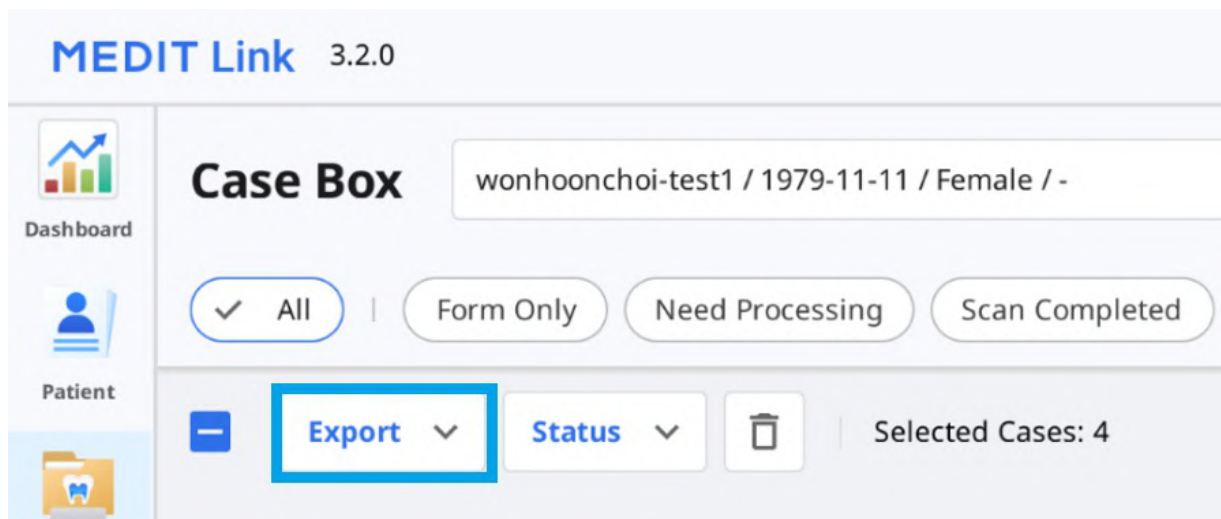

1. Mergi la Case Box sau Work Box.
2. Selectează din listă toate cazurile în care vrei să exporti fișiere de rezultate.

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 Status ▾ |
 |
 Selected Cases: 4

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

Dashboard
 Patient
 Case Box
 Order Box
 Case Talk
 App Box

3. Clic „Exportă” și selectează „Fișiere rezultat”.

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. Setează dosarul de destinație, tipul de fișier, formatul de rețea și formatul de imagine și selectează opțiunile de export în fila „Opțiuni”.

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type 

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export



Câmpurile „Nume dosar” și „Nume fișier” nu sunt editabile atunci când exporti fișiere pentru mai multe cazuri.

Numele dosarului și numele fișierului sunt create automat în conformitate cu regulile pe care le-ai setat pentru opțiunile „Regulă pentru Nume dosar” și „Regulă pentru Nume fișier” din Setări > Opțiuni de export.

5. Clic „Exportă”.
6. Clic pe „Da” pentru a deschide dosarul în care sunt salvate fișierele.

Question




Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Exporte rezultate fișier din Vizualizare fișier

Poți exporta fișierele cu rezultatele scanării pentru un caz cu ajutorul pictogramei „Exportă” din colțul din dreapta sus al filei Vizualizare fișier.

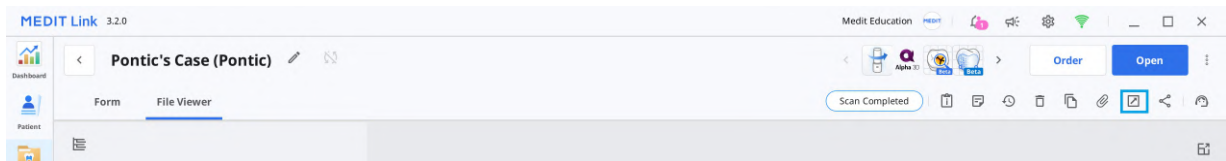

1. Mergi la Case Box sau Work Box.
2. Clic pentru a deschide un caz din listă.
3. Clic pe pictograma „Exportă” din colțul din dreapta sus al filei Vizualizare fișier.

4. Setează dosarul de destinație, numele dosarului, numele fișierului, tipul de fișier, formatul rețelei și formatul imaginii și selectează opțiunile de export în fila „Opțiuni”.

Export files in case

Options**File List**

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

5. În fila „Lista de fișiere” poți selecta fișierele necesare pentru caz, deselectarea celor inutile.

Export Files in This Case

Options

File List

☒

☒

Maxilla

☒ Base

☒

Mandible

☒ Base

☒

Occlusion

☒ First Occlusion
☒ Second Occlusion

☒

Dynamic Occlusion

☒

Free

☒ Maxilla
☒ Mandible

☒

Face Scan Data

☒ Face Scan Data

Close

Export

6. Clic „Exportă”.

7. Clic pe „Da” pentru a deschide dosarul în care sunt salvate fișierele.

Question

?

Exporting successfully completed.


Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Exportă rezultate fișiere din Arborele de date


Poți exporta un fișier sau fișiere dintr-un anumit grup de date din meniul extins din vizualizare fișier.

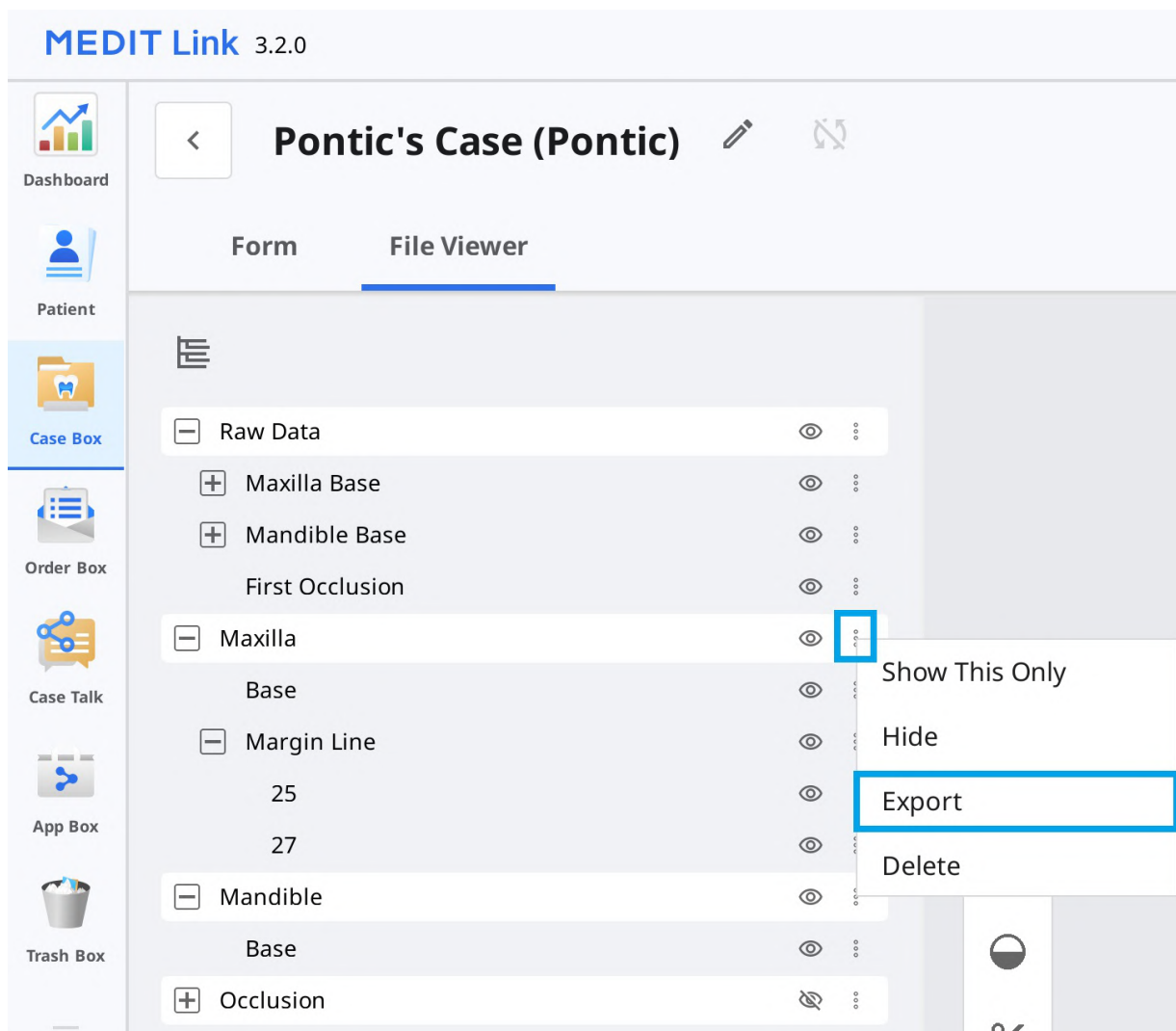

1. Mergi la Case Box sau Work Box.
2. Clic pentru a deschide un caz din listă.
3. Clic pe pictograma cu trei puncte de lângă grupul de date sau o entitate din arborele de date din fila Vizualizare fișier.



4. După clic „Exportă”.

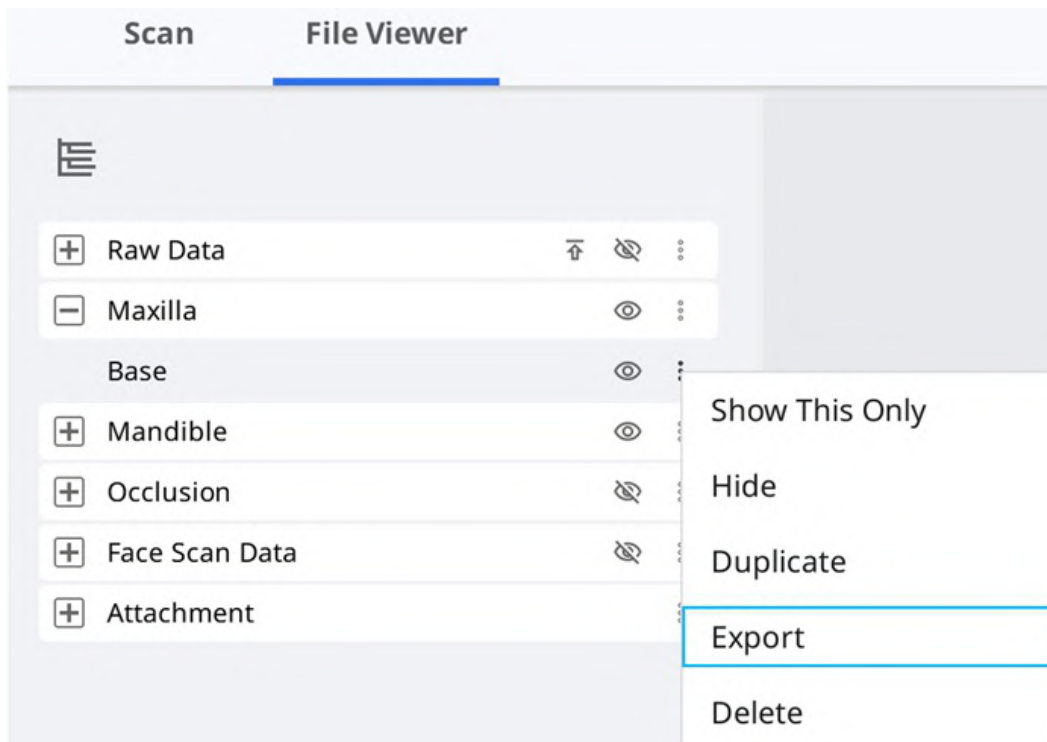

5. Setează dosarul de destinație, numele dosarului, numele fișierului, tipul de fișier, formatul rețelei și formatul imaginii și selectează opțiunile de export în fila „Opțiuni”.

Export files in case

Options
File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close
Export

6. Poți vedea că numai fișierele pe care le-ai ales în arborele de date sunt selectate în Lista de fișiere.

Export Files in This Case

Options **File List**

- ☐ Maxilla
 - ☐ Base
- ☒ Mandible
 - ☒ Base
- ☐ Occlusion
 - ☐ First Occlusion
 - ☐ Second Occlusion
- ☐ Dynamic Occlusion
 - ☐ Free
 - ☐ Maxilla
 - ☐ Mandible
- ☐ Face Scan Data
 - ☐ Face Scan Data

Close Export

7. Clic „Exportă”.

8. Clic pe „Da” pentru a deschide dosarul în care sunt salvate fișierele.

Question

 Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

Exportă lista de cazuri ca CSV

Medit Link oferă funcția de a exporta lista de cazuri în format CSV.

Poți exporta lista de cazuri cu informații de bază și poți gestiona cazurile cu ușurință.

1. Mergi la Case Box, Order Box, In Box sau Work Box.
2. Selectează cazurile pe care se dorești să le exporti.


MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi Clinic

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - +2

Export Status Selected Cases: 4 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-19 오전 11:00			
Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:15			
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:10	2023-08-18 오전 9:00		

3. Clic „Exportă” și selectează „Lista cazurilor (după cum se afișează)” sau „Lista cazurilor (cu toate articolele)”.

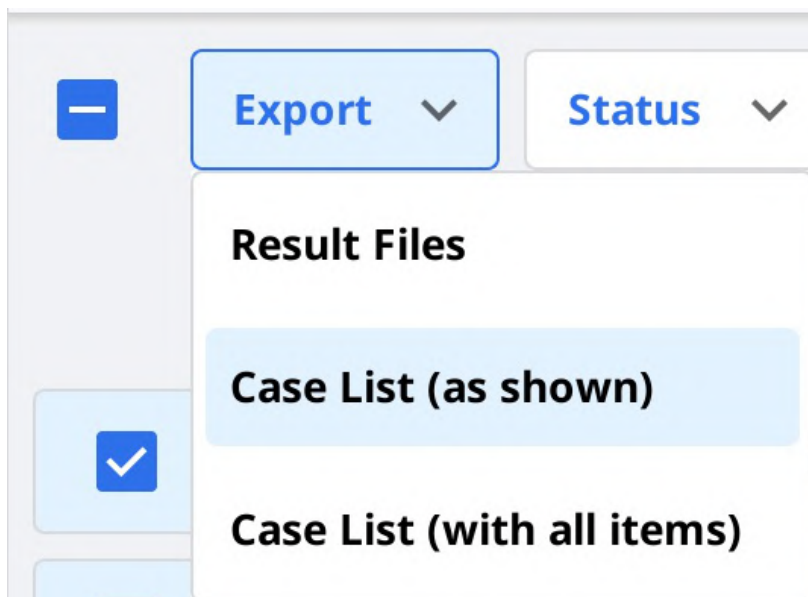

Lista cazurilor (după cum se afișează): Exportă lista de cazuri cu elementele afișate în prezent pe ecran. Mergi la Vizualizează opțiuni > Tabel articole pentru a afișa sau ascunde elementele după cum vrei.

Lista cazurilor (cu toate articolele): Exportați lista de cazuri cu toate elementele, inclusiv Status, Nume caz, Data nașterii, Informații formular, Ultima modificare, Data scanării, Data comenzii și Nume Laborator.

4. Definește calea și numele fișierului, apoi salvează lista.
5. Lista de cazuri este salvată sub forma unui fișier CSV.

Exportă Linia marginală


Medit Scan for Clinics oferă o funcție de creare a liniei marginale, iar Medit Link poate transfera linia marginală în programul CAD.

Exportă linia marginală ca o culoare

În general, Medit Link convertește linia marginală în culoare și exportă rezultatul cu maxilarul sau mandibula împreună. Poți crea linia marginală în cad-ul lor făcând referire la informațiile de culoare.

Exemplu:

Maxilar

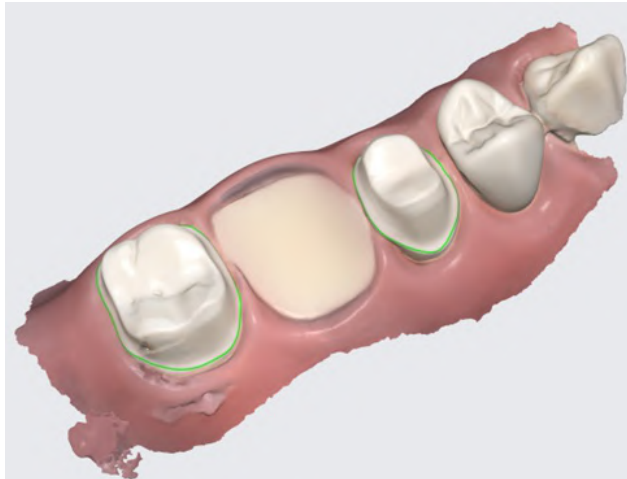

Rezultat cu liniile marginale ca informație de culoare

🔍 Aviz

Această funcție este disponibilă pentru formatele care includ informații despre culori, cum ar fi meditMesh, OBJ și PLY. Linia marginală nu se convertește în STL.

🔍 Aviz

Tip > 3Shape nu acceptă această funcție.


Exportă linia marginală ca fișier

În cazul Exocad, Medit Link exportă linia marginală în „~margin.xyz”, care poate fi importată direct în exocad.

Poți utiliza acest fișier în exocad fără lucrări suplimentare.


Exemplu:

Maxilar

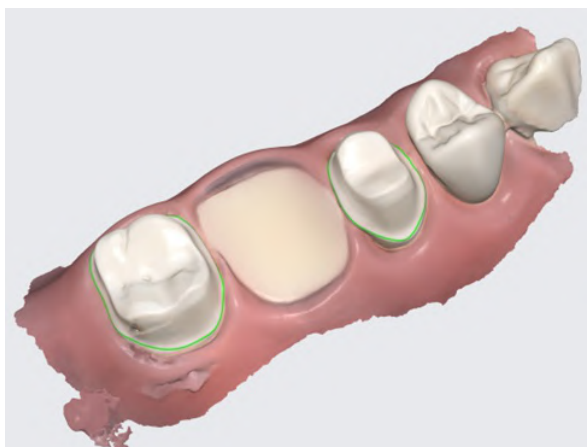

Rezultat cu liniile marginale ca informație de culoare

Linie marginală

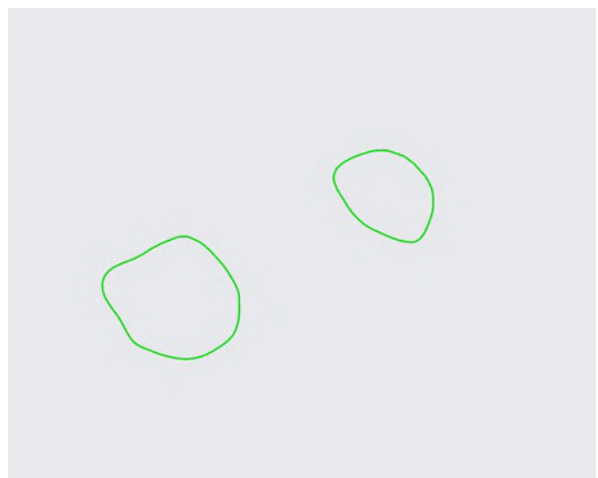

Linia marginală exportată ca fișiere individuale

Descarcă fișiere de pe Medit Link Web

Medit Link oferă o funcție de descărcare.

Dacă dorești să obții fișierele de rezultate fără a instala aplicația Medit Link, poți descărca fișierele de pe serviciul web Medit Link.

Aviz


Datele trebuie să fie încărcate pe Medit Cloud pentru a descărca fișierele de pe web.

Funcția de descărcare este disponibilă în următorul meniu al serviciului web Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Poți găsi butonul „Descarcă” în dreapta sus.

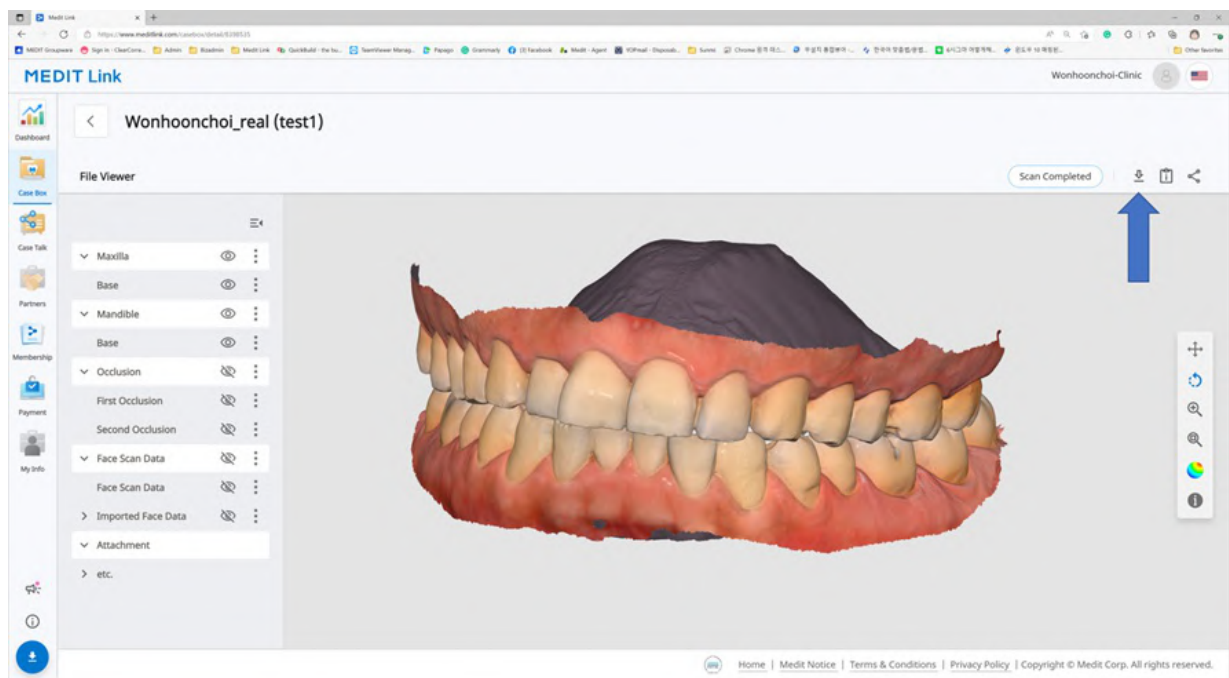

Web Viewer

Atunci când partajezi un caz utilizând Case Talk, poți seta dacă permiți sau nu descărcarea.

Dacă bifezi „Acordă permisiunea de descărcare” și partajezi cazul, toți utilizatorii care se conectează la link-ul partajat pot descărca fișierele.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close **Get Link**

În Web Viewer, poți găsi pictograma „Descarcă” în dreapta sus.

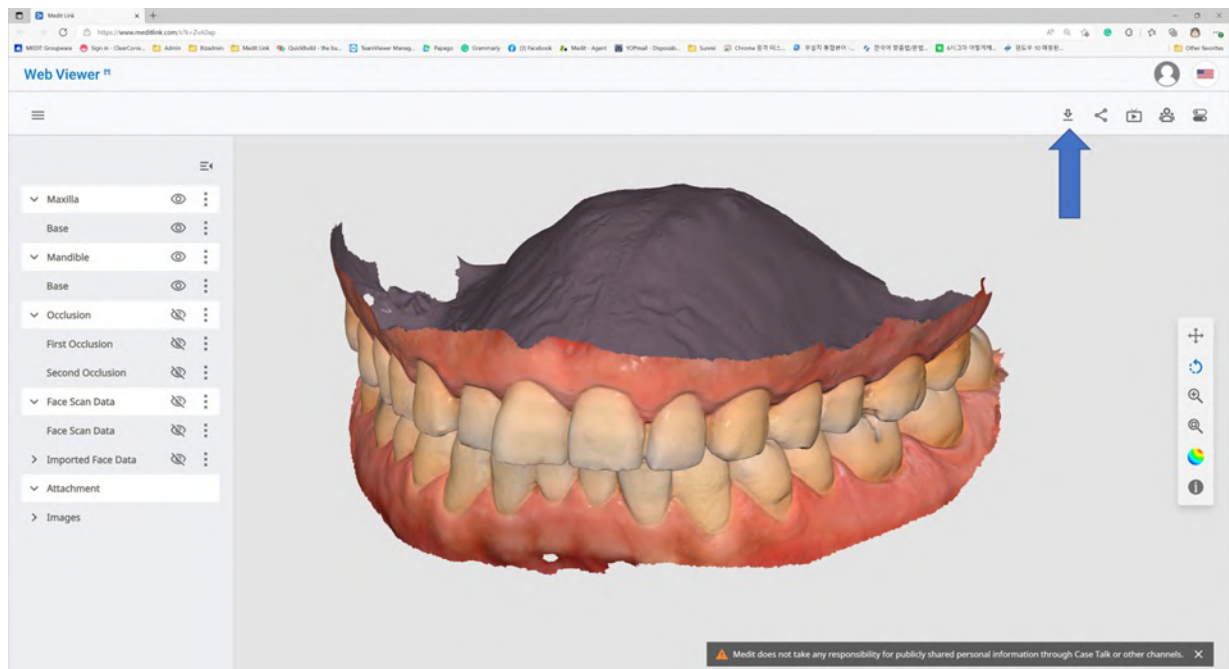

1. Clic „Descarcă”.



2. Selectează formatul de rețea din fereastra de dialog pentru descărcare.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close **OK**

3. După clic „OK”.

134

Comandă/gestionează comenzi

Poți comanda cu ușurință un caz cu date obținute de la programele conectate și atașate de utilizator.

Comandarea cazurilor

Poți plasa o comandă pentru partenerii tăi în Case Box.

1. Clic pe butonul „Comandă”.
2. Verifică informațiile necesare pentru comanda ta.

The screenshot shows the 'Order' form with the following fields and options:


- Order** (Section Header)
- General** (Active tab), **Order List**, **File List**
- Partner**: WonhoonChoi_Lab_Stage
- Partner Information**:
 - Icon: A person at a computer.
 - WonhoonChoi_Lab_Stage**
 - Seoul, KR
 - [02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
 - 01026088546
- Case Name**: mandibluar movement - Clone - Clone
- Patient Name**: Test Occlusion
- ☒ **Share patient information**
- Requested Delivery Date**: 2023-04-13
- Delivery Time**: 오전 8:15 (AM 8:00 to PM 8:00 range)
- Memo**: (Empty text area)
- Tags**:
 - You can add the entered tag with Enter or Spacebar.
 - You can add up to 10 tags of 100 characters or less.
- ☒ **Include all occlusion relationships in the order**
- ☒ **Include Tags In The Order**
- Buttons**: Cancel, OK

3. Selectează un partener.
4. Verifică informațiile despre produs din fila Lista de comenzi.
 - Poți decide dacă vrei să împărtășești numele pacientului.
5. Verifică fișierele de comandat din fila Lista de fișiere.
6. Introduce data de livrare dorită.
 - Valoarea implicită este setată la 7 zile de la data comenzii.
7. Poți adăuga o notă și etichete partenerului tău pentru a sublinia detalii specifice.
8. Atunci când rezultatele ocluzale multiple generate de aplicația de scanare, poți trimite toate rezultatele ocluzale deodată, bifând „Comandă toate rezultatele ocluzale”.

9. Continuă cu comanda.


Confirmă comanda (In Box)

- Accept the order upon receiving it.
- Comenzile acceptate vor fi transmise către Work Box.

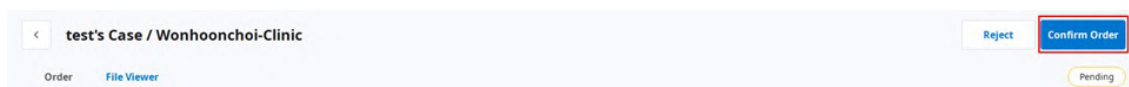


Anulează comanda (Order Box)

- Poți anula o comandă înainte ca partenerul tău să o accepte.
- Cazurile anulate pot fi comandate din nou.

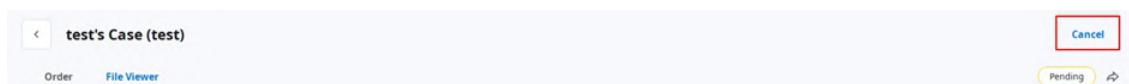


Refuză comanda (In Box)

- Poți respinge o comandă primită.
- Cazurile respinse pot fi comandate din nou.

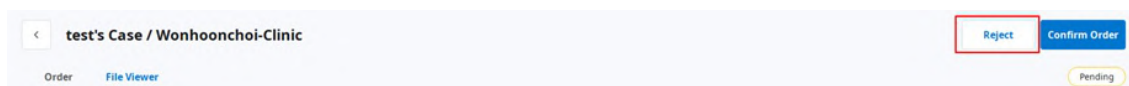

Verificarea cazurilor comandate

Poți verifica detaliile cazului pe care l-ai comandat de la Order Box în contul clinic. Poți verifica, de asemenea, cazul pe care l-ai primit din In Box în contul de laborator.

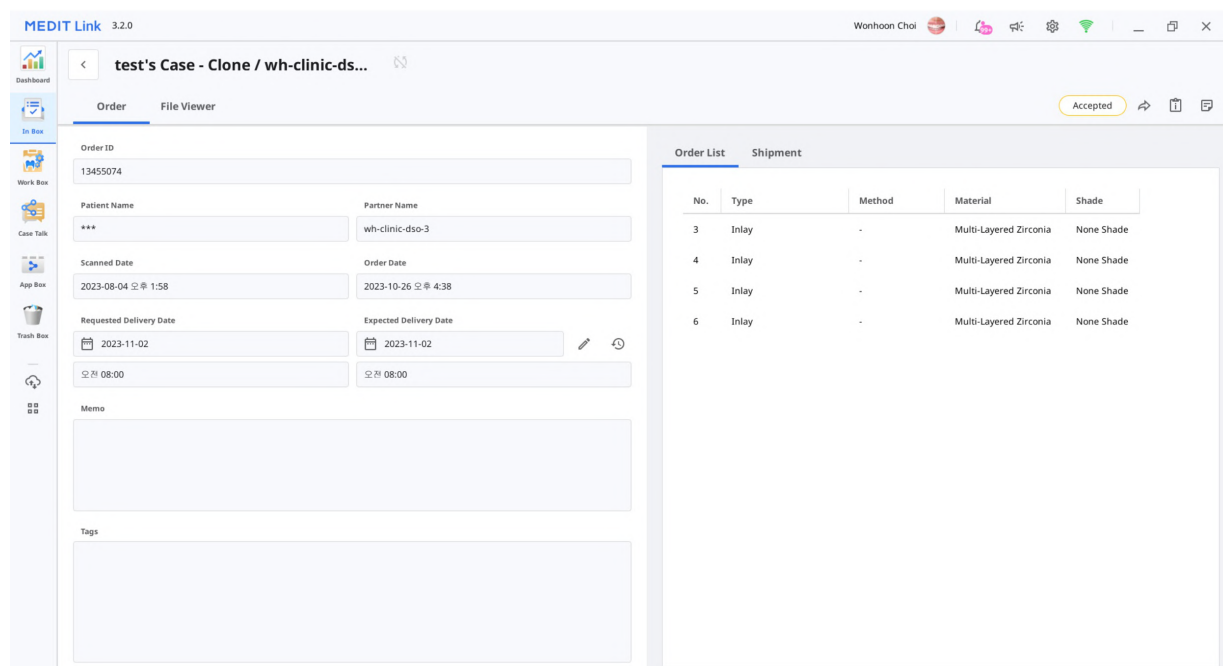

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Informații comandă	Informațiile care pot fi incluse în comandă sunt următoarele: ID-ul comenzii/numele pacientului/numele contului/data scanării/data comenzii/data livrării/data scadenței livrării/memo. Poți verifica detaliile produsului comandat și informațiile privind livrarea.
Listă comenzi	Lista de comenzi afișează detaliile produsului comandat.
Expediere	Introdu/verifică informațiile de expediere.

Introducerea informațiilor despre expediere (In Box)

Introdu informațiile de expediere a cazului finalizat și începe expedierea.

1. Clic pe fila Expediere.
2. Introdu informațiile despre expediere și clic pe „Înregistrează”.

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Informațiile introduse sunt trimise partenerului tău.

Gestionarea datei de livrare

Poți stabili data de livrare preconizată atunci când plasezi o comandă, iar această informație va fi transmisă partenerului tău.

Setarea datei de livrare solicitate (cont clinică)

- Atunci când comanzi de la Case Box, poți introduce data de livrare dorită.

Order

General **Order List** File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Valoarea implicită este de 7 zile de la data comenzii.
- Introdu data/ora la care dorești să primești produsele și continuă cu comanda.
- Poți seta cu ușurință ora cu ajutorul cursorului.

Setare Data estimată de livrare (cont Laborator)

- Poți introduce data de livrare preconizată pentru cazul comandat de la In Box.

MEDIT Link 3.0.0

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오전 7:56

Order Date
2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Memo
<Scanbody Library>
16 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0


1. Verifică data de livrare solicitată împreună cu partenerul și reprogreamază cu ajutorul butonului „Editează”.



2. Introdu data de livrare preconizată, luând în considerare ziua lucrătoare efectivă. Dacă este necesar, poți

lăsa și un comentariu.

3. Clic „Aplică”.

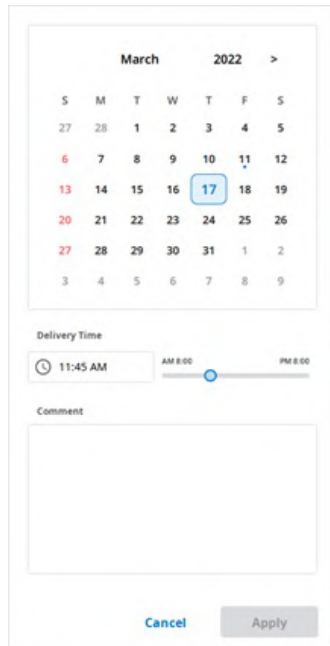

The screenshot shows a mobile application interface for selecting a delivery date and time. At the top, there is a calendar for March 2022. The date 17 is highlighted with a blue circle. Below the calendar, there is a section for 'Delivery Time' with a clock icon and a time slider set to 11:45 AM. Below that is a 'Comment' section with a text input field. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'Apply'.

4. Data de livrare preconizată și nota vor fi transmise împreună cu comanda.

- Poți verifica data și memo-urile în Order Box.
- Poți modifica data de livrare preconizată, iar modificările vor fi transmise partenerului tău.

5. Poți verifica istoricul cazului folosind butonul „Istoric”.



Finalizarea cazului

Complet (Work Box/In Box)


După îndeplinirea tuturor sarcinilor, clic pe „Gata” pentru a finaliza cazul.

Completează un caz din detaliile cazului

Poți găsi pictograma cu trei puncte în dreapta de la butonul „Deschide” sau „Scanează din nou”.




Finalizează lucrarea făcând clic pe pictogramă și selectând „Done”.

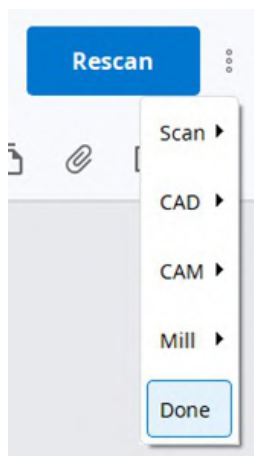

Completează cazurile multiple din lista de cazuri

1. Mergi la Work Box.
2. Selectează toate cazurile de completat.

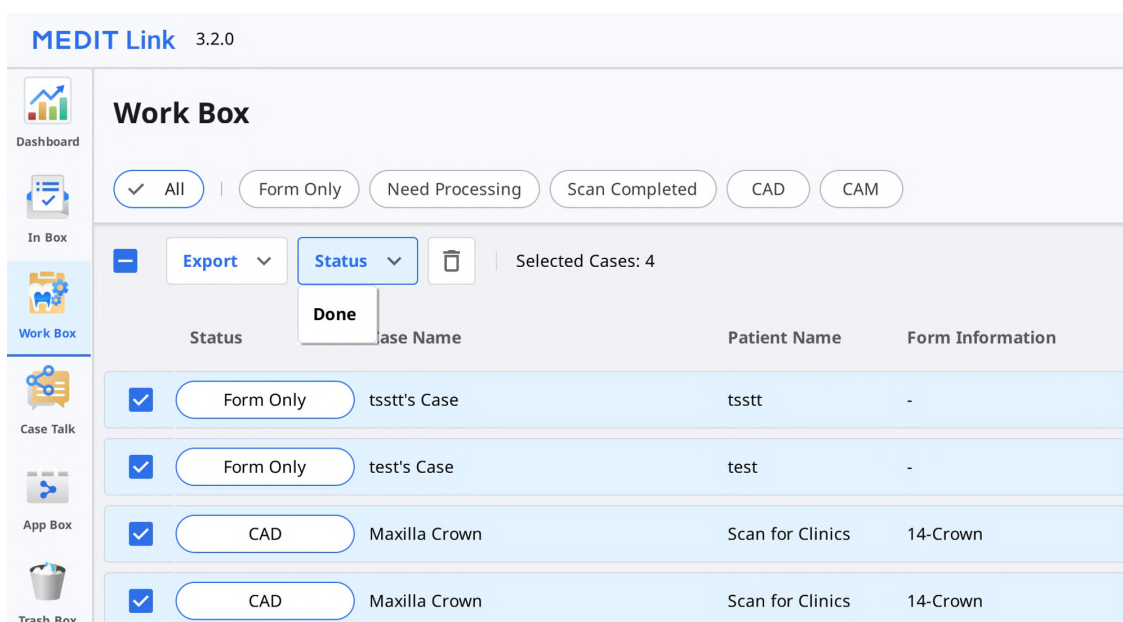


3. Clic „Status” și selectează „Gata”.

Complet (Case Box/Order Box)

După ce cazul este finalizat în laborator, clinica trebuie să confirme cazul pentru a finaliza întregul proces de comandă.

Clinica poate găsi butonul „Confirmă livrarea” în Order Box dacă laboratorul își finalizează activitatea.

Clic pe aceasta, întregul proces de comandă se finalizează, iar statutul cazului se va schimba în „Case Completed”.

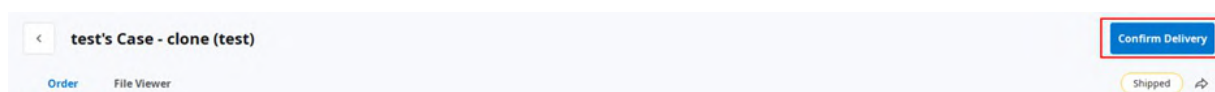

Termină un caz necomandat în Case Box

Pentru cazurile care nu sunt comandate la laborator, poți completa aceste cazuri din Case Box.

1. Mergi la Case Box.
2. Selectează cazul pe care dorești să îl completezi.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Case Box

Patient

✓ All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Cas

Export

Status

Selected Cases: 4

Case Completed

Status	Case Name
☐ Ordered test	test's Case
☒ Scan Completed wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case
☒ Scan Completed test test(1234)	G11598492310180503424
☒ Scan Completed test	test's Case
☒ Scan Completed test	test's Case

3. Clic „Status” și selectează „Case Completed”.

Comunică folosind etichete

Poți să adaugi informații suplimentare pentru cazul tău folosind etichete și să le trimiți partenerilor tăi.

Adaugă etichete la crearea unui caz nou

Poți introduce etichete atunci când creezi un caz nou sau când editezi informații despre caz.

New Case Information

Patient Name*


Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

Poți căuta și selecta cu ușurință etichete pe care le-ai mai folosit.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Adaugă etichete la comandă

Poți verifica și edita etichetele în caseta de dialog Comandă în timpul comenzii.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

AM 8:00 오전 8:15 PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Verifică etichetele de pe Detaliile cazului

