


# USER GUIDE

Medit Link (Revision 10) 2025.03.18

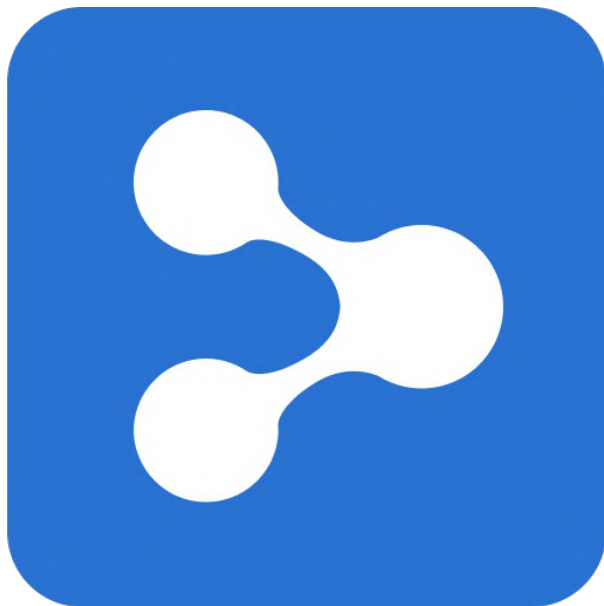

# Table of Contents

## Medit Link

|                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| Introdução .....                                                              | 7 |
| Medit Link .....                                                              | 7 |
| Visão geral do serviço .....                                                  | 7 |
| Serviço na nuvem .....                                                        | 8 |
| Plataforma de gerenciamento de fluxo de trabalho com sistema de pedidos ..... | 9 |

## Medit Link > Instalação

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Requisitos do sistema .....                       | 10 |
| Requisitos do sistema para Windows .....          | 10 |
| Requisitos do sistema para macOS .....            | 10 |
| Requisitos do sistema para serviço da Web .....   | 10 |
| Navegadores recomendados .....                    | 10 |
| Requisitos mínimos para dispositivos móveis ..... | 10 |
| Instalação no Windows .....                       | 11 |
| Instalação no macOS .....                         | 14 |

## Medit Link > Comece a usar

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Cadastrar-se e fazer login .....       | 18 |
| Site do Medit Link .....               | 18 |
| Cadastrar-se .....                     | 18 |
| Página de login e de boas-vindas ..... | 21 |

## Medit Link > Medit Link Web

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dashboard .....                                                                           | 24 |
| Visão geral do Dashboard .....                                                            | 24 |
| Medit Insights .....                                                                      | 24 |
| Inscrever-se no Medit Insights .....                                                      | 25 |
| Cancelar inscrição no Medit Insights .....                                                | 26 |
| Patient .....                                                                             | 27 |
| Pesquisar paciente .....                                                                  | 27 |
| Case Box/Work Box .....                                                                   | 28 |
| Filtragem de caso .....                                                                   | 28 |
| Filtrar por paciente .....                                                                | 28 |
| Filtrar por estado .....                                                                  | 31 |
| Filtrar por duração .....                                                                 | 31 |
| Filtrar por pesquisa .....                                                                | 32 |
| Detalhes do caso .....                                                                    | 32 |
| Order Box/In Box .....                                                                    | 34 |
| Detalhes da encomenda .....                                                               | 34 |
| Guias em Order Box/In Box .....                                                           | 34 |
| Case Talk .....                                                                           | 35 |
| Criação de um Case Talk .....                                                             | 35 |
| Definição do tipo de permissão de compartilhamento e das opções de compartilhamento ..... | 36 |
| Detalhes do Case Talk .....                                                               | 38 |
| Web Viewer .....                                                                          | 39 |
| Anotação .....                                                                            | 40 |
| Comentários .....                                                                         | 42 |

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Compartilhamento de tela em tempo real .....                                                                 | 42 |
| Árvore de dados .....                                                                                        | 42 |
| Controles da árvore de dados .....                                                                           | 42 |
| Controles de modelo 3D .....                                                                                 | 43 |
| Partners .....                                                                                               | 44 |
| Procurar parceiros .....                                                                                     | 44 |
| Minha lista de parceiros .....                                                                               | 44 |
| Convite para parceiro .....                                                                                  | 45 |
| Membership .....                                                                                             | 46 |
| Assinatura .....                                                                                             | 46 |
| Medit Cloud Storage Plan .....                                                                               | 46 |
| Armazenamento na nuvem .....                                                                                 | 48 |
| Inscrever-se .....                                                                                           | 48 |
| Cancelar Subscrição .....                                                                                    | 50 |
| Minha Assinatura .....                                                                                       | 51 |
| Detalhes .....                                                                                               | 52 |
| Renovar assinatura .....                                                                                     | 52 |
| Como adicionar um método de pagamento .....                                                                  | 53 |
| Como alterar um método de pagamento .....                                                                    | 54 |
| Resgatar .....                                                                                               | 54 |
| Detalhes .....                                                                                               | 55 |
| Registrar código de resgate .....                                                                            | 55 |
| Ativar código de resgate .....                                                                               | 56 |
| Detalhes de pagamento .....                                                                                  | 56 |
| Ver detalhes da fatura .....                                                                                 | 57 |
| My Info .....                                                                                                | 59 |
| Minha conta .....                                                                                            | 59 |
| Minha clínica/Meu laboratório (apenas conta de Administrador) .....                                          | 59 |
| Meu scanner .....                                                                                            | 60 |
| Menu Outros .....                                                                                            | 62 |
| Aviso e atualização .....                                                                                    | 62 |
| Sites relacionados .....                                                                                     | 62 |
| Download do aplicativo Medit Link .....                                                                      | 63 |
| <br>Medit Link > Aplicativo Medit Link                                                                       |    |
| Visão geral .....                                                                                            | 64 |
| A tabela abaixo resume quais menus estão disponíveis em cada tipo de conta de clínica e de laboratório. .... | 64 |
| Barra de título .....                                                                                        | 65 |
| Minhas informações .....                                                                                     | 65 |
| Notificações .....                                                                                           | 65 |
| Notícias e Atualização .....                                                                                 | 66 |
| Configurações .....                                                                                          | 66 |
| Estado da rede .....                                                                                         | 67 |
| Configurações .....                                                                                          | 69 |
| Geral .....                                                                                                  | 69 |
| Gerenciamento do armazenamento .....                                                                         | 70 |
| Definir período .....                                                                                        | 71 |
| Armazenamento local .....                                                                                    | 71 |
| Armazenamento na nuvem .....                                                                                 | 71 |
| Definir o programa conectado .....                                                                           | 72 |
| Opções de exportação .....                                                                                   | 72 |
| Ferramenta de conversão de casos .....                                                                       | 74 |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Exportar caso .....                                                    | 75  |
| Importar caso .....                                                    | 76  |
| Opções de proxy .....                                                  | 78  |
| Sobre .....                                                            | 78  |
| Guia do usuário .....                                                  | 79  |
| Menu .....                                                             | 80  |
| Dashboard .....                                                        | 80  |
| Patient .....                                                          | 80  |
| Adicionar novo paciente .....                                          | 81  |
| Excluir paciente .....                                                 | 81  |
| Mesclar pacientes .....                                                | 82  |
| Case Box/Work Box .....                                                | 82  |
| Guias em Case Box/Work Box .....                                       | 83  |
| Funções em Case Box/Work Box .....                                     | 83  |
| Order Box/In Box .....                                                 | 84  |
| Guias em Order Box/In Box .....                                        | 85  |
| Case Talk .....                                                        | 85  |
| App Box .....                                                          | 86  |
| Tudo .....                                                             | 86  |
| Medit Apps .....                                                       | 87  |
| Baixados .....                                                         | 87  |
| Trash Box .....                                                        | 87  |
| Gerenciador da sincronização de casos .....                            | 88  |
| Upload .....                                                           | 88  |
| Download .....                                                         | 89  |
| Sites relacionados .....                                               | 89  |
| Visualizador de arquivos .....                                         | 91  |
| Árvore de dados .....                                                  | 91  |
| Ferramentas de controle de modelo .....                                | 91  |
| Controles de modelo 3D .....                                           | 92  |
| Controle de imagem 2D .....                                            | 93  |
| Ferramentas de função .....                                            | 93  |
| Captura de imagens e nota .....                                        | 94  |
| Captura de ortodontia .....                                            | 94  |
| Preencher buracos .....                                                | 95  |
| Recorte .....                                                          | 96  |
| Otimizar alinhamento da oclusão .....                                  | 98  |
| Movimento mandibular .....                                             | 101 |
| Gerenciamento dos dados multioclusão no Visualizador de arquivos ..... | 101 |
| Como gerenciar vários resultados .....                                 | 101 |
| Opções de visualização .....                                           | 103 |
| Filtros do estado .....                                                | 103 |
| Tipo de visualização .....                                             | 104 |
| Agrupamento .....                                                      | 104 |
| Ordenação .....                                                        | 104 |
| Filtragem e pesquisa .....                                             | 106 |
| Filtrar por paciente .....                                             | 106 |
| Filtrar por data .....                                                 | 107 |
| Recursos avançados de pesquisa .....                                   | 108 |
| Medit Link > Fluxo de trabalho                                         |     |
| Criar/Editar/Clonar/Excluir caso .....                                 | 109 |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Criar casos .....                                                 | 109 |
| Criar casos na Case Box (Clínica) .....                           | 109 |
| Criar casos na Work Box (Laboratório) .....                       | 110 |
| Editar casos .....                                                | 110 |
| Editar casos na Case Box (Clínica) .....                          | 110 |
| Editar casos na Work Box (Laboratório) .....                      | 111 |
| Clonar casos .....                                                | 112 |
| Clonar caso na Case Box (Clínica) .....                           | 112 |
| Clonar caso na Work Box (Laboratório) .....                       | 112 |
| Excluir caso .....                                                | 113 |
| Excluir caso (Clínica e Laboratório) .....                        | 113 |
| Informações do formulário .....                                   | 114 |
| Registrar informações do formulário na Case Box .....             | 114 |
| Inserir na guia Formulário .....                                  | 114 |
| Registrar informações do formulário na Work Box .....             | 114 |
| Inserir na guia Formulário .....                                  | 114 |
| Conectar dentes à ponte .....                                     | 114 |
| Definição das opções de escaneamento .....                        | 115 |
| Medit Scan for Labs .....                                         | 115 |
| Opções gerais .....                                               | 115 |
| Opções por dente .....                                            | 115 |
| Adicionar aos favoritos .....                                     | 115 |
| Adicionar aos favoritos .....                                     | 116 |
| Gerenciar templates favoritos .....                               | 116 |
| Trabalhar em escaneamento/CAD .....                               | 117 |
| Processo de escaneamento .....                                    | 117 |
| Processo de CAD .....                                             | 117 |
| Utilização de aplicativos complementares .....                    | 117 |
| Complemento Inicializador rápido .....                            | 117 |
| Gerenciamento do inicializador de aplicativos .....               | 117 |
| Inicializador rápido .....                                        | 118 |
| Todos os apps .....                                               | 118 |
| Obter arquivos de resultados .....                                | 119 |
| Exportar arquivos de resultados de escaneamento .....             | 119 |
| Exportar arquivos de resultados da lista de casos .....           | 120 |
| Exportar arquivos de resultados do Visualizador de arquivos ..... | 123 |
| Exportar arquivos de resultados da árvore de dados .....          | 124 |
| Exportar a lista de casos como CSV .....                          | 127 |
| Exportar a linha de margem .....                                  | 128 |
| Exportar a linha de margem como uma cor .....                     | 128 |
| Exportar a linha de margem como um arquivo .....                  | 129 |
| Download de arquivos do Medit Link Web .....                      | 129 |
| Case Box/Work Box .....                                           | 130 |
| Web Viewer .....                                                  | 130 |
| Pedir/gerenciar pedidos .....                                     | 133 |
| Pedidos de casos .....                                            | 133 |
| Confirmar pedido (In Box) .....                                   | 134 |
| Cancelar pedido (Order Box) .....                                 | 134 |
| Rejeitar pedido (In Box) .....                                    | 134 |
| Verificação de casos pedidos .....                                | 134 |
| Inserir informações de envio (In Box) .....                       | 135 |
| Gerenciamento da data de entrega .....                            | 135 |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Configuração da data de entrega solicitada (conta de clínica) .....   | 135 |
| Configuração da data de entrega estimada (conta de laboratório) ..... | 136 |
| Concluir caso .....                                                   | 137 |
| Concluir (Work Box/In Box) .....                                      | 137 |
| Concluir um caso nos detalhes dele .....                              | 137 |
| Concluir vários casos na lista de casos .....                         | 138 |
| Concluir (Case Box/Order Box) .....                                   | 138 |
| Concluir um caso sem pedido na Case Box .....                         | 138 |
| Comunicar usando etiquetas .....                                      | 140 |
| Adicionar etiquetas ao criar um caso .....                            | 140 |
| Adicionar etiquetas ao fazer pedido .....                             | 141 |
| Verificar etiquetas em detalhes do caso .....                         | 141 |

# Introdução

## Medit Link

O Medit Link é uma ferramenta de colaboração projetada para facilitar a comunicação entre clínicas e laboratórios e fornecer um fluxo de trabalho otimizado para cada parte envolvida.

Ele oferece funcionalidades diferenciadas com base no tipo e nas permissões de cada conta. O programa fornece uma interface de usuário amigável para gerenciar o fluxo de trabalho, desde o escaneamento com scanners orais e de modelos, pedidos de casos e design e produção de próteses.

O Medit Link é composto por um serviço da web e um aplicativo de computador.

## Visão geral do serviço

|             |               | Web                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aplicativo                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrar e gerenciar a conta</li> <li>• Pesquisar e gerenciar parceiros</li> <li>• Compartilhar casos via Web Viewer com um link compartilhável</li> <li>• Acessar casos criados no aplicativo</li> <li>• Gerenciar pedidos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserir informações do formulário</li> <li>• Escanear</li> <li>• Gerenciar pedidos</li> <li>• Vincular ao CAD</li> <li>• Gerenciar pacientes</li> </ul>                                                                      |
| Clínica     | Administrador | Pesquise e gerencie parceiros e suas clínicas e compartilhe casos. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dashboard</li> <li>• Patient</li> <li>• Case Box</li> <li>• Order Box</li> <li>• Case Talk</li> <li>• Partners</li> <li>• Membership</li> <li>• My Info</li> </ul>   | Insira informações do formulário, escaneie, faça pedidos e gerencie pacientes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dashboard</li> <li>• Patient</li> <li>• Case Box</li> <li>• Order Box</li> <li>• Case Talk</li> <li>• App Box</li> <li>• Trash Box</li> </ul> |
|             | Membro        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patient</li> <li>• Case Box</li> <li>• Order Box</li> <li>• Case Talk</li> <li>• My Info</li> </ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patient</li> <li>• Case Box</li> <li>• Case Talk</li> <li>• Order Box</li> <li>• App Box</li> <li>• Trash Box</li> </ul>                                                                                                     |
| Laboratório | Administrador | Pesquise e gerencie parceiros e seu laboratório e compartilhe casos. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dashboard</li> <li>• In Box</li> <li>• Work Box</li> <li>• Case Talk</li> <li>• Partners</li> <li>• Membership</li> <li>• My Info</li> </ul>                       | Insira informações do formulário, escaneie e gerencie pedidos. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dashboard</li> <li>• In Box</li> <li>• Work Box</li> <li>• Case Talk</li> <li>• App Box</li> <li>• Trash Box</li> </ul>                                       |
|             | Membro        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In Box</li> <li>• Work Box</li> <li>• Case Talk</li> <li>• My Info</li> </ul>                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In Box</li> <li>• Work Box</li> <li>• Case Talk</li> <li>• App Box</li> <li>• Trash Box</li> </ul>                                                                                                                           |

## Serviço na nuvem

O Medit Link oferece suporte ao upload/download automático de bancos de dados e arquivos do AWS (Amazon Web Services).

Os dados armazenados na nuvem são sincronizados automaticamente com os computadores de vários usuários na organização para que eles possam acessar os mesmos dados de qualquer computador a qualquer momento. O backup e a recuperação baseados em nuvem mantêm todos os seus dados seguros. Isso mantém seus dados seguros mesmo em caso de perda de dados devido a falha repentina do computador.

O serviço na nuvem permite que dentistas e laboratórios parceiros compartilhem dados rapidamente sem o incômodo de enviar os escaneamento por e-mail ou transferi-los manualmente. Todos os dados, incluindo informações do paciente, são criptografados, armazenados e transmitidos com segurança. A Medit está em conformidade com as leis e os regulamentos médicos, como HIPAA e GDPR.

## Plataforma de gerenciamento de fluxo de trabalho com sistema de pedidos

O Medit Link oferece seu próprio sistema de pedidos.

- O Medit Link permite aos usuários estabelecer parcerias entre dentistas e laboratórios dentários e compartilhar dados de forma rápida e fácil.
- Você pode verificar e gerenciar o status do pedido.

## Requisitos do sistema

### Observação

Consulte os requisitos do sistema do Medit Scan for Clinics e do Medit Scan for Labs se quiser usar o software de escaneamento com seu scanner.

## Requisitos do sistema para Windows

|                | Laptop e computador                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CPU            | Intel Core i5 2.6 GHz ou superior                                             |
| RAM            | 16 GB ou superior                                                             |
| Placa de vídeo | NVIDIA GeForce GT 760 (2 GB) ou superior/ou placa de vídeo equivalente da AMD |
| SO             | Windows 10 de 64 bits (não disponível em 32 bits) ou superior                 |

## Requisitos do sistema para macOS

|             | Mac                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Processador | M1 com 8 núcleos, GPU de 7 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos |
| RAM         | 16 GB ou superior                                               |
| SO          | Monterey 12 ou superior                                         |

## Requisitos do sistema para serviço da Web

### Navegadores recomendados

|         | Navegadores                              |
|---------|------------------------------------------|
| PC      | Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium) |
| Android | Chrome, Firefox                          |
| macOS   | Safari, Chrome, Firefox                  |


### Requisitos mínimos para dispositivos móveis

|             | Android                             | iOS                                |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Dispositivo | Equivalente a Galaxy S7 ou superior | Equivalente a iPhone 7 ou superior |
| SO          | Android 7.1 Nougat                  | iOS 11.0                           |
| RAM         | 3 GB ou superior                    | 2 GB ou superior                   |
| AP          | Superior ao Snapdragon 710          | A10 Fusion                         |


## Instalação no Windows

O Medit Link é instalado como um pacote com programas de aquisição de escaneamento: o Medit Scan for Clinics e o Medit Scan for Labs.


1. Execute o programa Medit\_LinkSetup.exe.
2. Selecione um idioma para instalação.
3. Selecione a pasta para a instalação do Medit Link. Leia e concorde com os termos e condições da licença e clique em "INSTALAR".

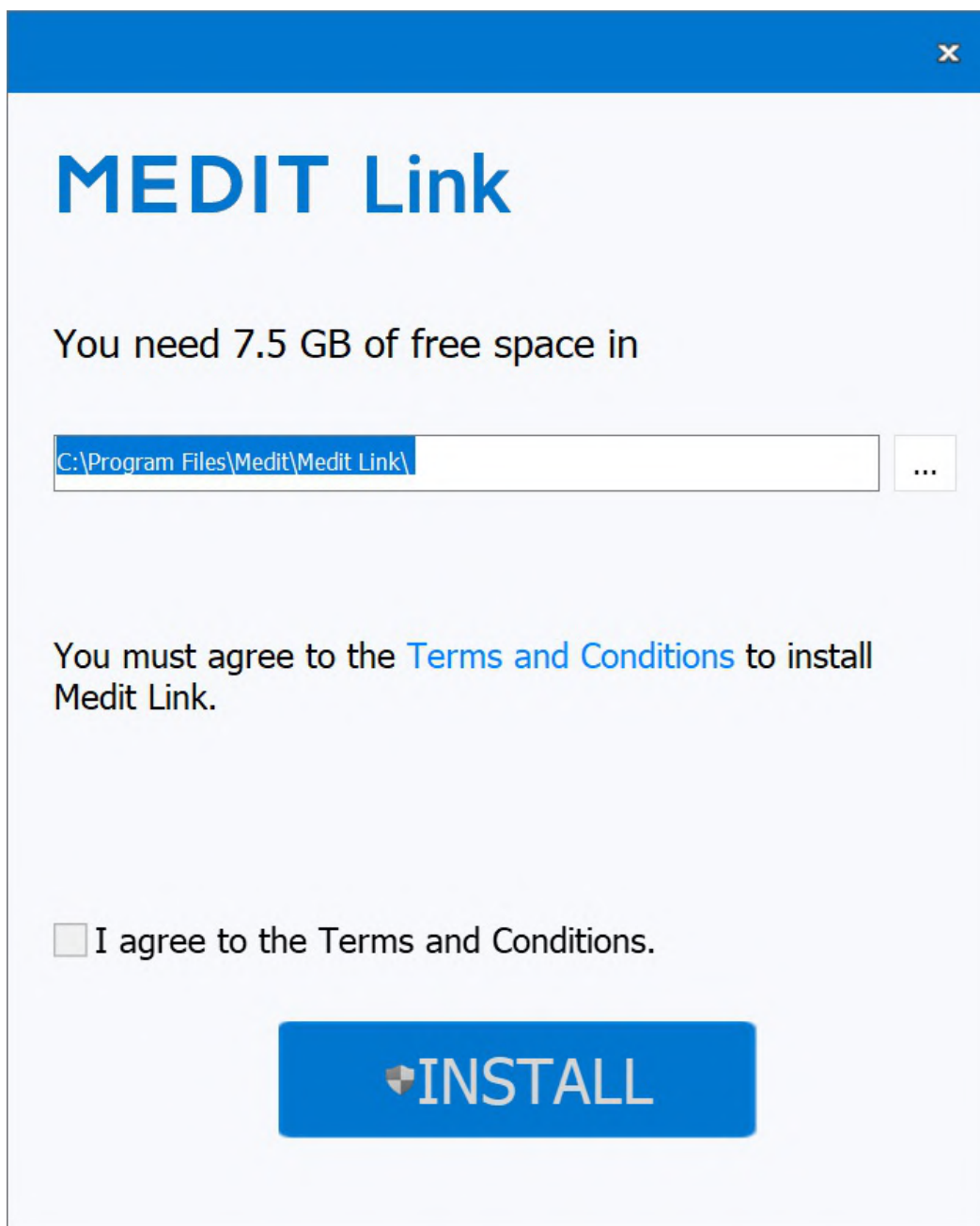

4. Certifique-se que o cabo do scanner esteja desconectado do computador antes de ir para a próxima etapa. A instalação não poderá prosseguir se o scanner estiver conectado ao seu PC.
5. O programa será instalado automaticamente, o que pode demorar alguns minutos. Não desligue ou tire da tomada o seu computador até a instalação estar concluída.

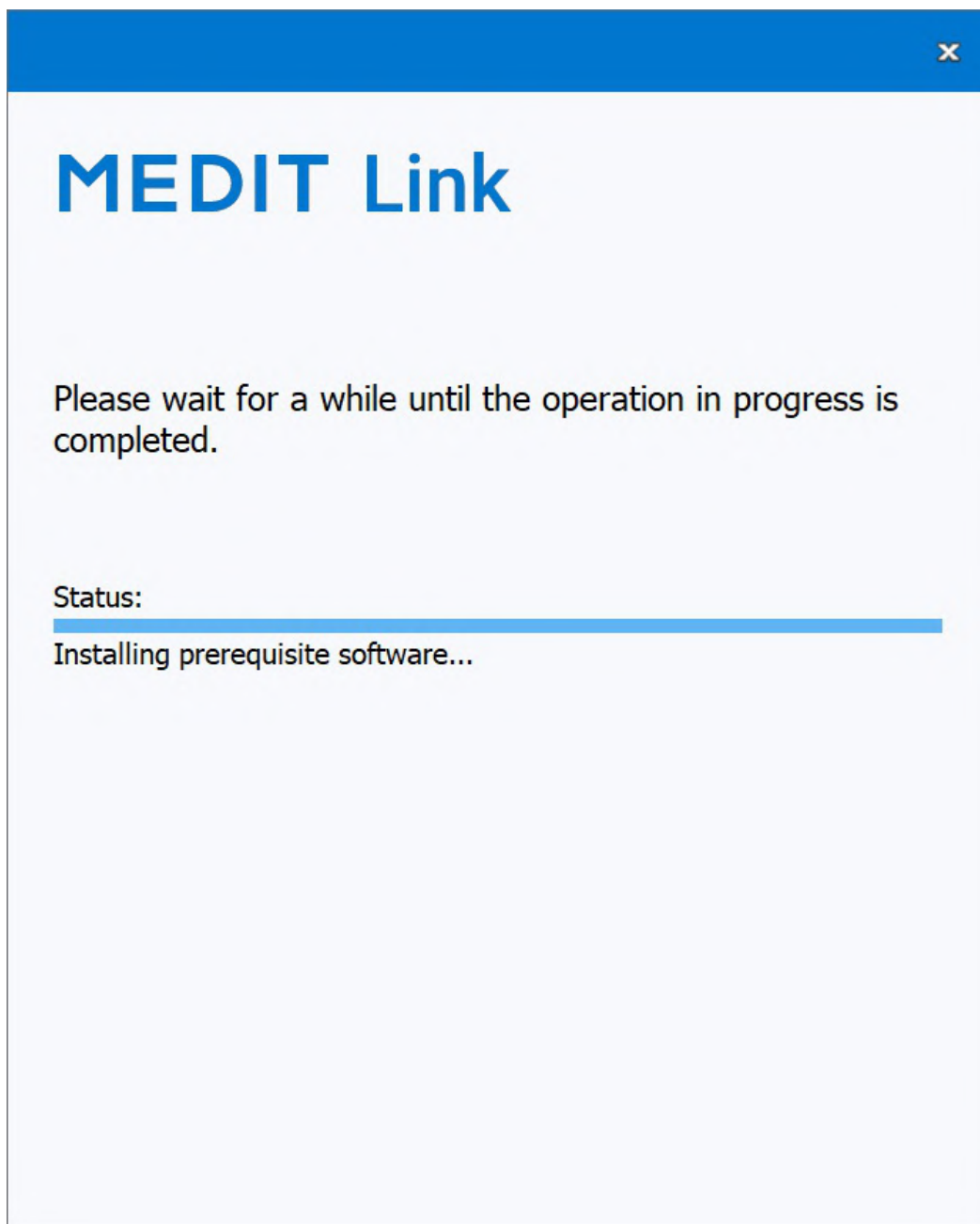

6. Reinicie o seu computador após a instalação ser concluída. Você pode continuar sem reiniciar o computador se não tiver o scanner.

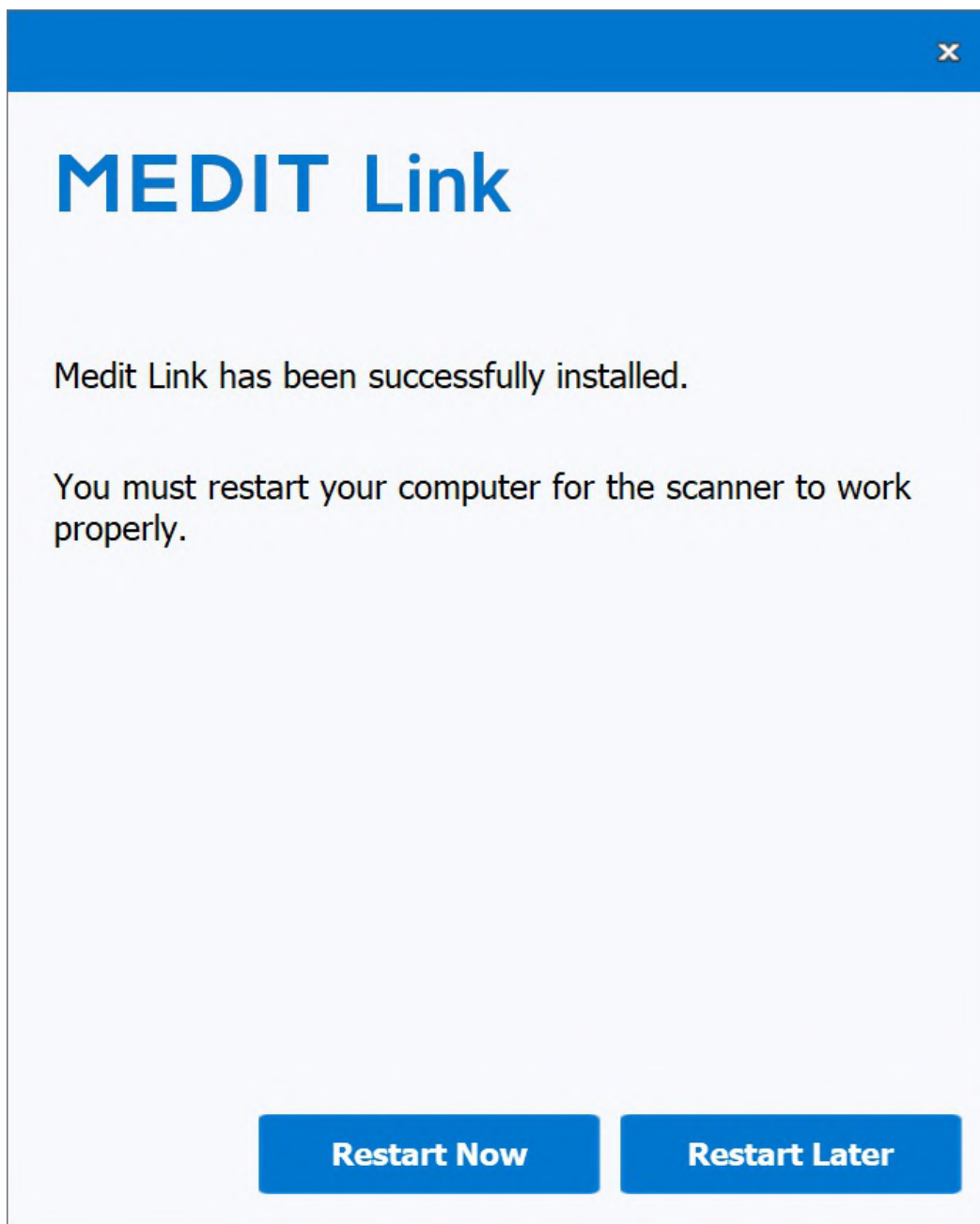


 **Observação**

Se você não reiniciar seu computador após a conclusão da instalação, o scanner talvez não funcione corretamente.


# Instalação no macOS

O Medit Link é instalado como um pacote com o Medit Scan for Clinics.


1. Execute o programa Medit\_Link\_x.x.x.pkg e clique em "Continuar".

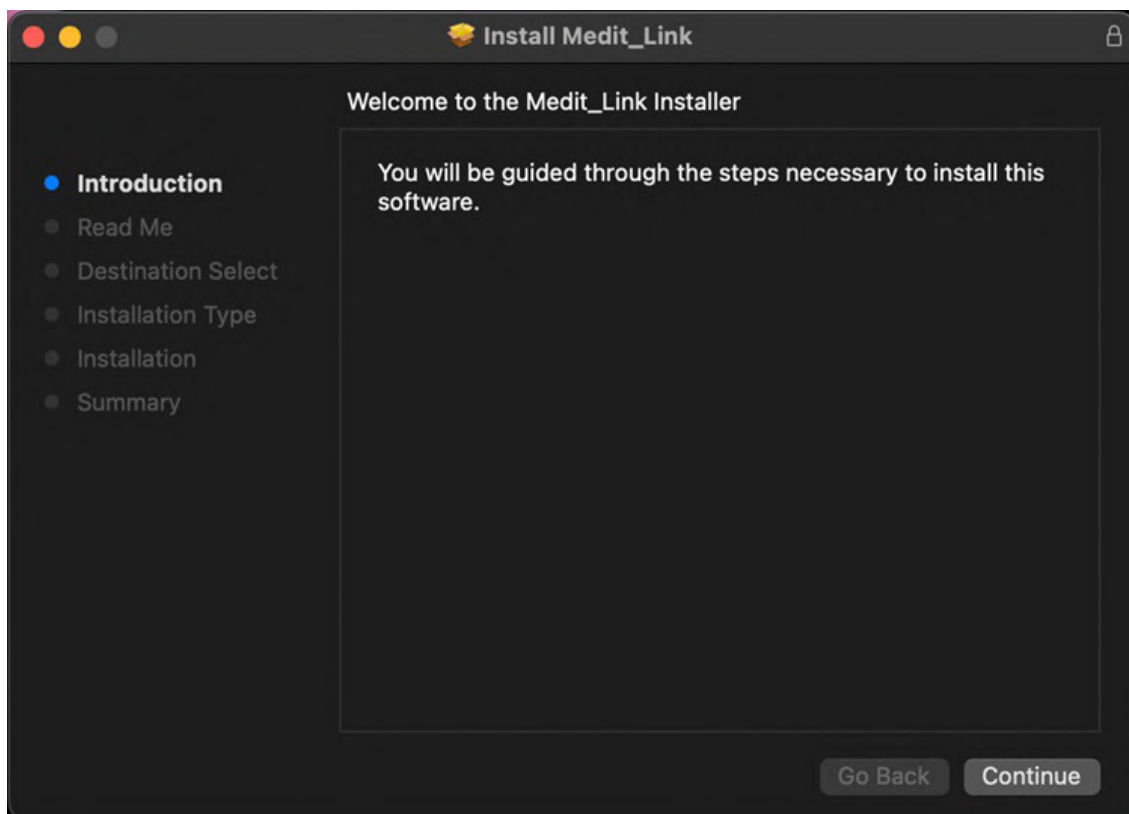


2. Leia o Contrato de licença de usuário final e clique em "Continuar".

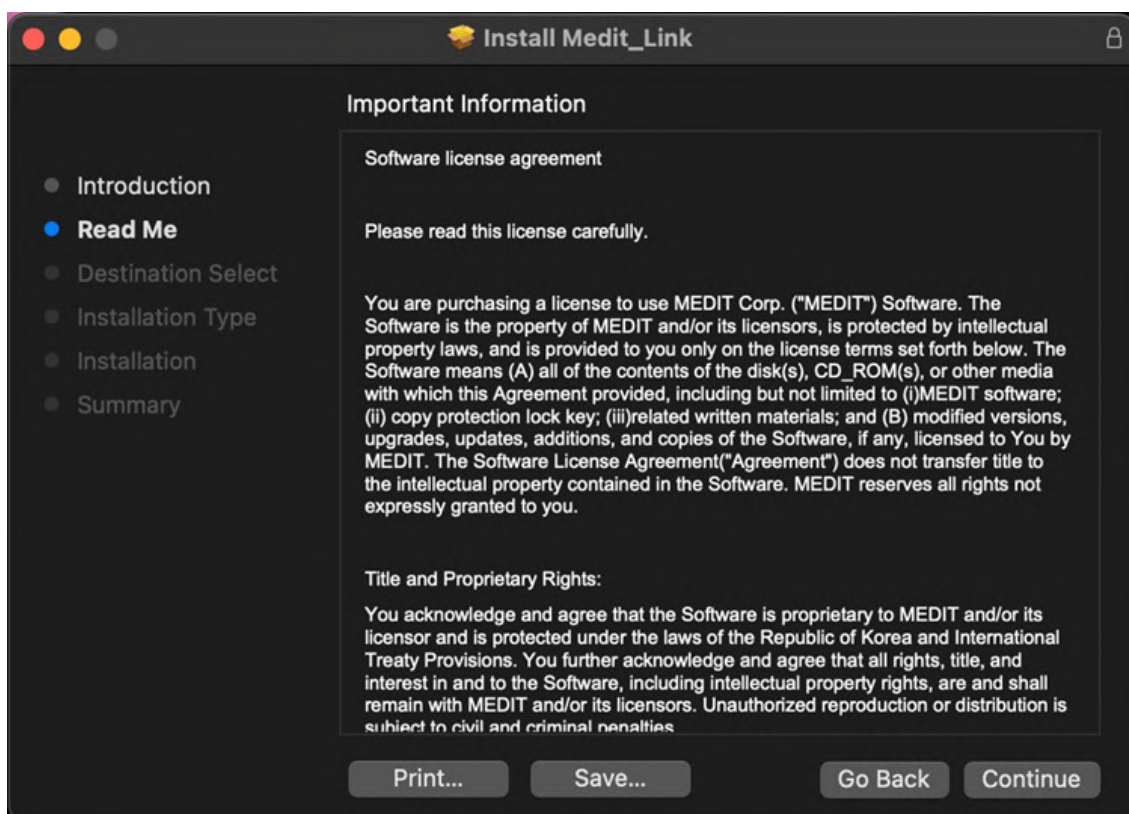


3. Selecione o disco para instalar e clique em "Continuar".

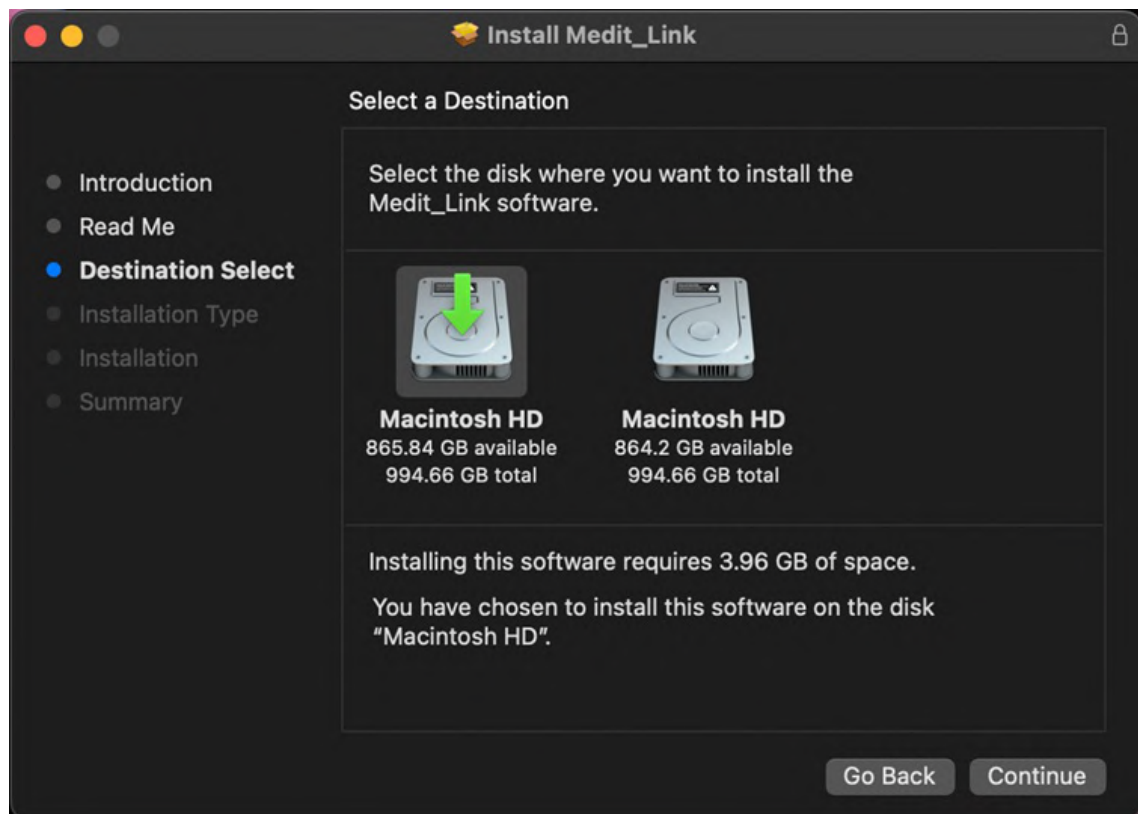


4. Clique no botão "Alterar local de instalação..." para alterar o destino da instalação.

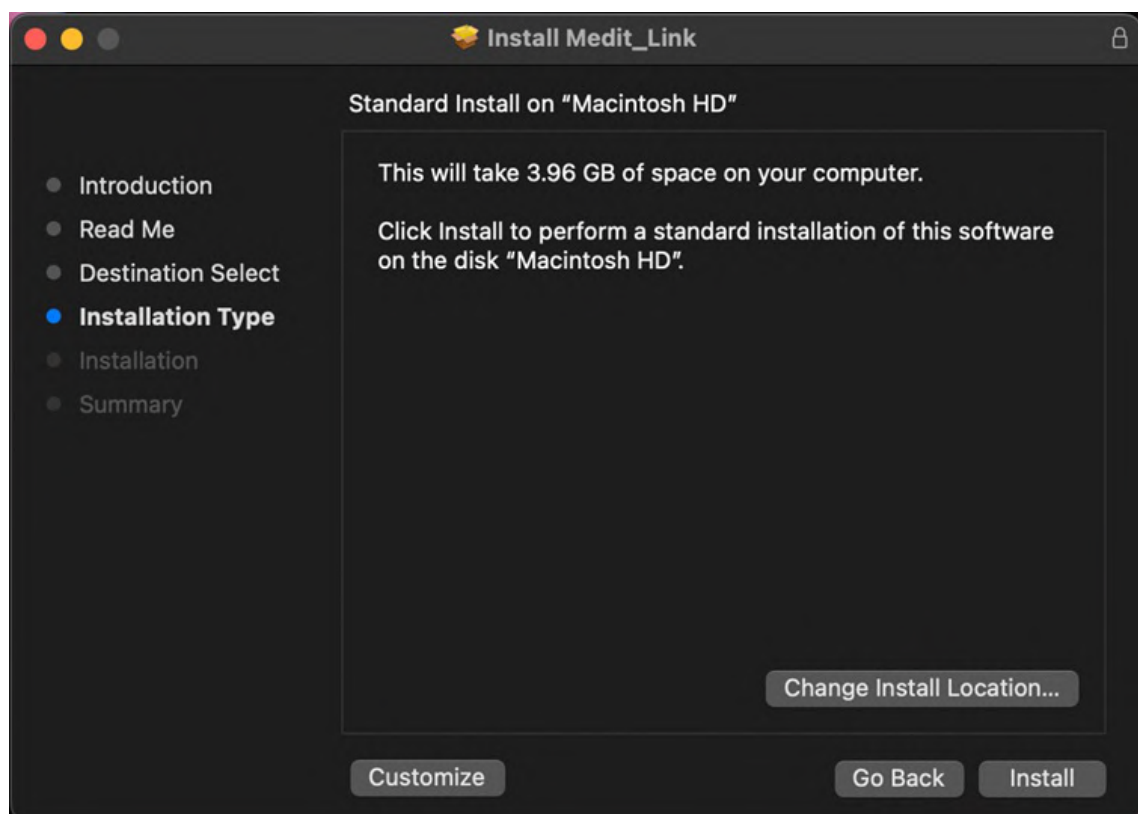


5. Clique em "Instalar" e digite sua senha do Mac para permitir a instalação, se solicitado.

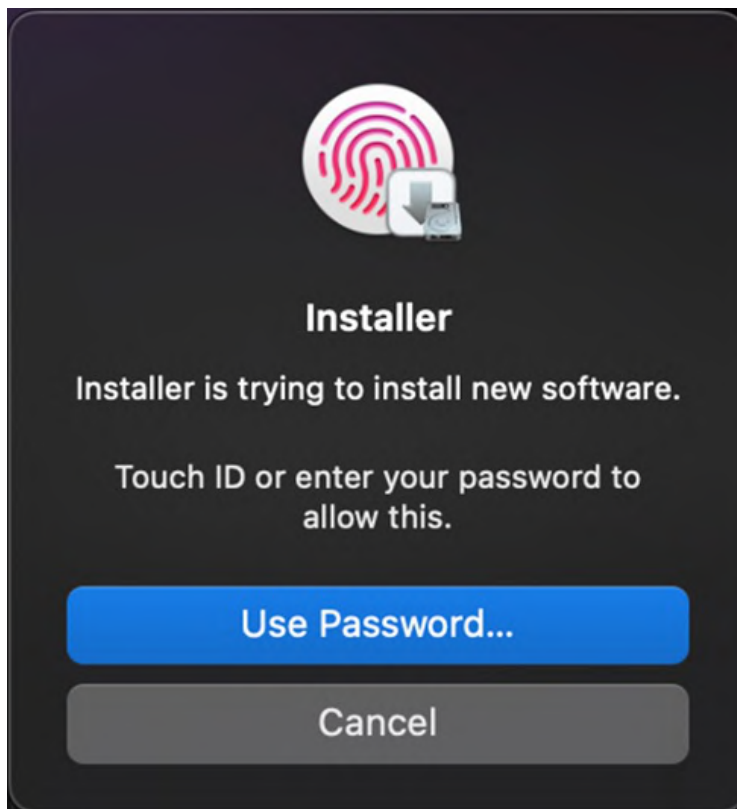

6. Aguarde a instalação ser concluída.

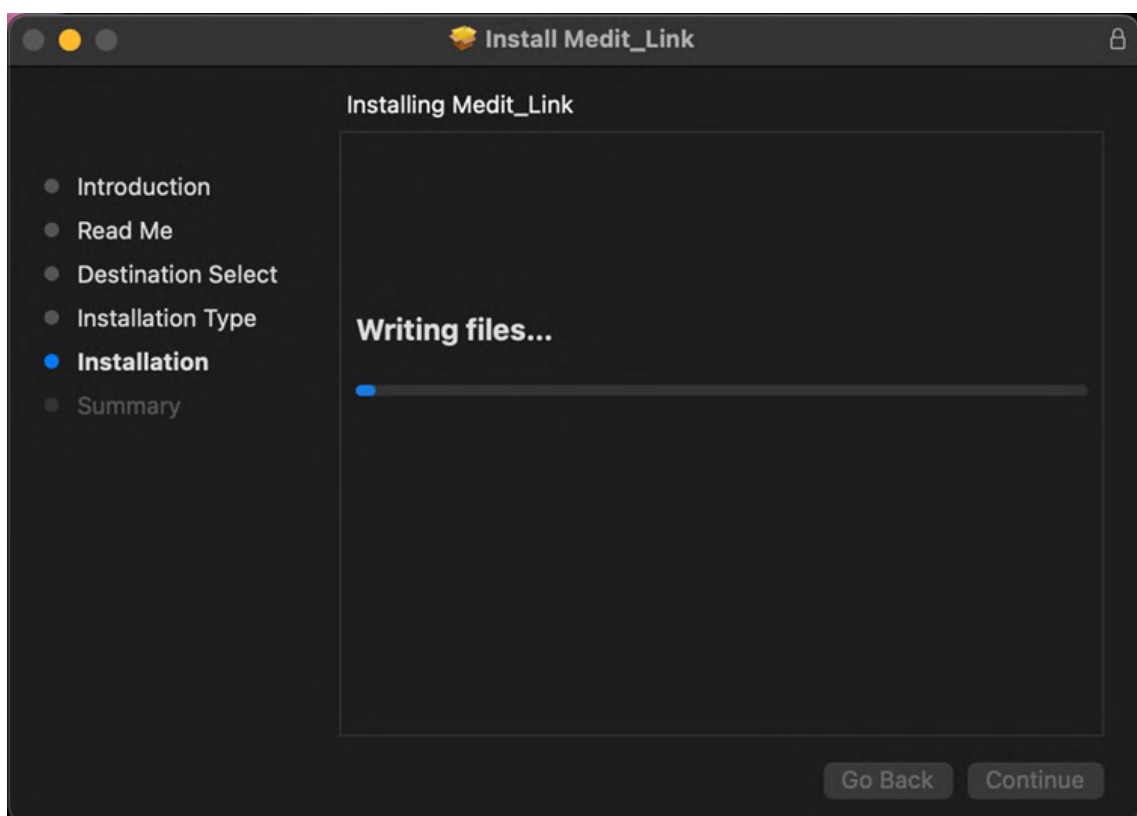


7. Clique em "Fechar" para sair da janela de instalação.

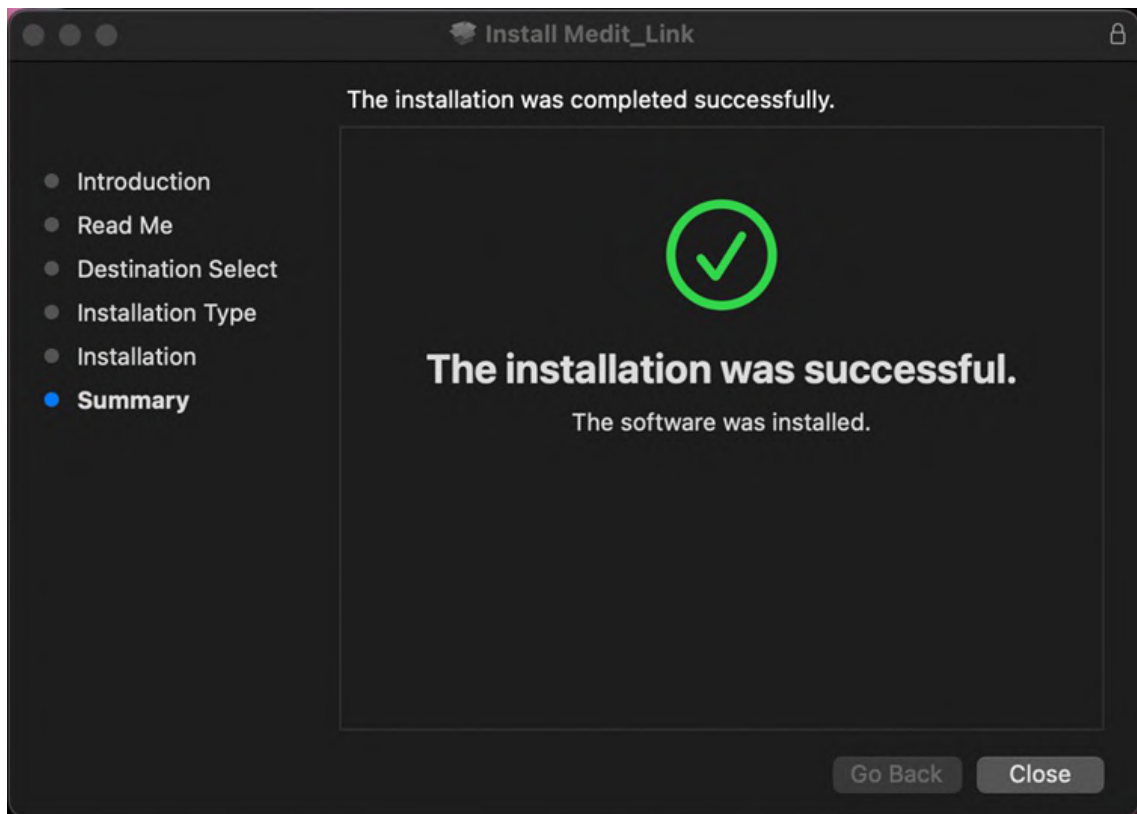

# Cadastrar-se e fazer login

## Site do Medit Link

Cadastre-se para o serviço Medit Link em [www.meditlink.com](http://www.meditlink.com).

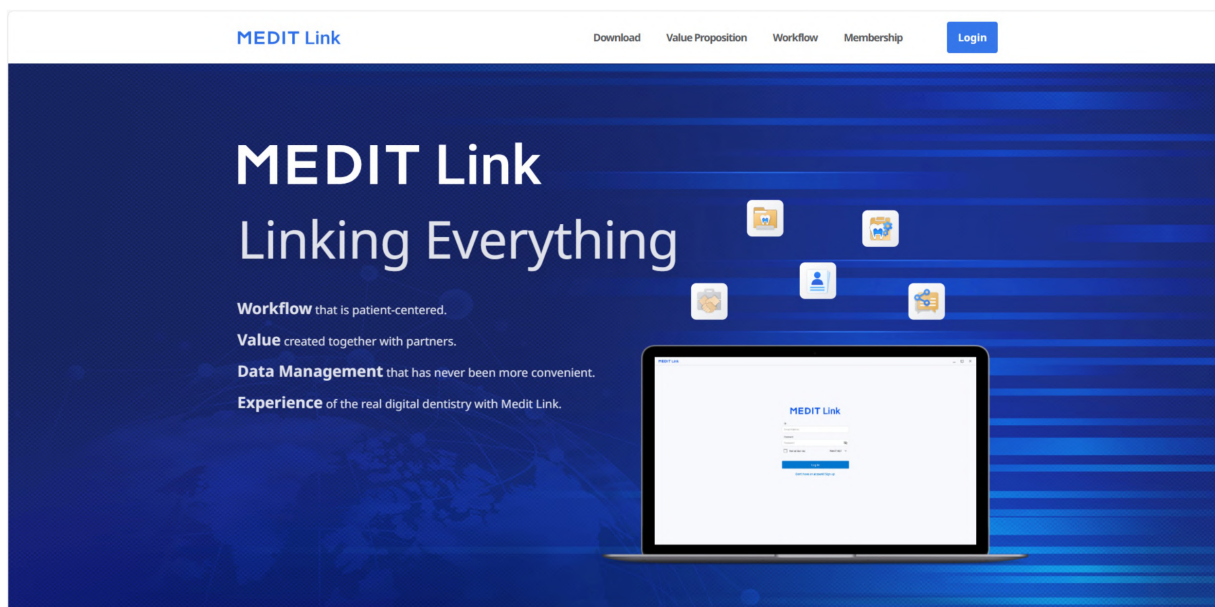

### Observação

Registre-se no Medit Link China em [www.meditlink.cn](http://www.meditlink.cn).

## Cadastrar-se

Para usar o serviço Medit Link, você deve se cadastrar em uma conta. Você pode utilizar as funcionalidades fornecidas no Medit Link depois de criar uma conta como clínica ou laboratório.

Os usuários podem selecionar um dos quatro tipos de conta a seguir para se registrar como membro e usar o serviço com funcionalidades e privilégios totais ou limitados, dependendo do tipo de conta.

- Clínica - Administrador
- Clínica - Membro
- Laboratório - Administrador
- Laboratório - Membro

Geralmente, o administrador é um representante da sua organização e terá acesso completo a todas as funções e serviços do Medit Link. Em contraste, a conta de membro tem acesso limitado.

Para se cadastrar com uma assinatura, execute estas etapas:

1. Clique em "Ainda não tem uma conta? Cadastre-se" na página de login.

# MEDIT Link

ID

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

**Log In**

**Don't have an account? [Sign up.](#)**



English (United States)



2. Depois de ler as descrições fornecidas, clique no botão "Registrar" do tipo de conta desejado.

## Create Your Medit Link Account



### Clinic

#### Administrator

##### Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register


#### Member

##### Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

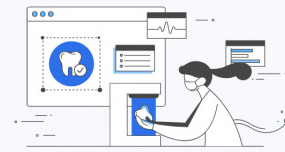

### Lab

#### Administrator

##### Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

#### Member

##### Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Aparece o seguinte formulário de inscrição.

## Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

View

View

View

Back

Register

- Insira o nome da clínica ou do laboratório e, dependendo do tipo de conta desejado, faça o seguinte:
  - Se você estiver se registrando como administrador, clique em "Verificar disponibilidade" para ver se o nome inserido está disponível.
  - Se você estiver se registrando como membro, clique em "Pesquisar". O administrador já deve ter registrado sua organização antes de você poder se cadastrar.
- Preencha o restante do formulário de registro e clique em "Registrar".

### Observação

Se você concordar em receber informações de marketing durante a inscrição, receberá informações úteis sobre produtos e serviços da Medit.

- Um e-mail de verificação será enviado para você.
- Para concluir o processo de registro, verifique seu endereço de e-mail usando o link recebido.

## Página de login e de boas-vindas

- Digite seu endereço de e-mail e senha na página de login e clique em "Login".

# MEDIT Link

ID

Password

☐

Keep me logged in.

Need help? ▾

**Log In**

**Don't have an account? Sign up.**




English (United States)



2. Aparecerá a seguinte janela pop-up se você não tiver preenchido suas informações de negócios.

Welcome, stage-test-wh!

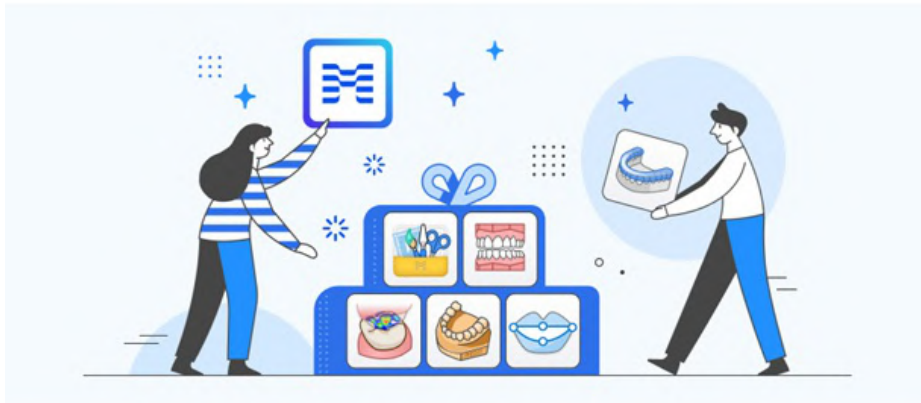

### Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps. All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

### Observação


Para usar os serviços do Medit Link, é preciso inserir as informações sobre sua clínica ou laboratório usando a conta de administrador.

3. Clique no botão "Acessar Minha clínica" ou "Acessar Meu laboratório" e insira as informações da clínica ou laboratório, incluindo nome da empresa, imagens de capa/logotipo, serviços que você oferece, endereço comercial, número comercial, etc.
4. É possível editar as informações inseridas na página de boas-vindas a qualquer momento em My Info > Minha clínica ou Meu laboratório no Medit Link Web.

# Dashboard

## Visão geral do Dashboard

É possível visualizar as estatísticas de todo o trabalho realizado no Medit Link em gráficos e tabelas visualizados, tanto no aplicativo Medit Link quanto na sua versão para Web.

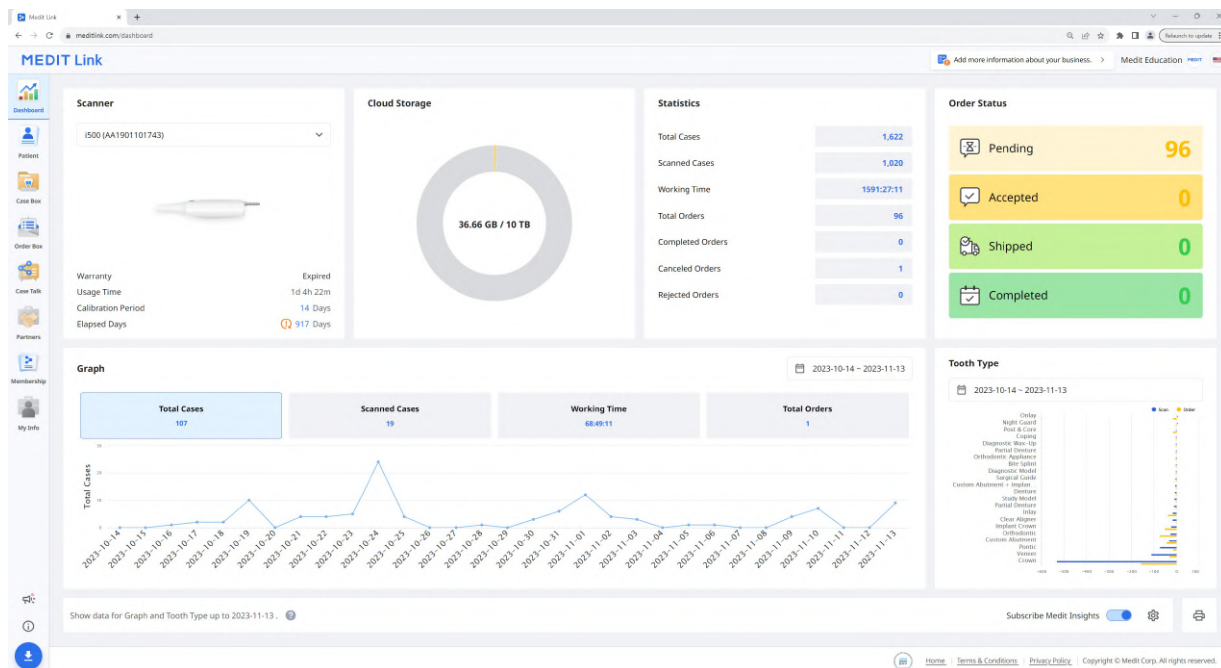

Gráficos e tabelas no dashboard mostram estatísticas de todo o trabalho feito no Medit Link.

|                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scanner                | Fornecer informações sobre os scanners ativos, incluindo garantia, tempo de uso do scanner, intervalo de calibração e tempo decorrido de calibração. |
| Armazenamento na nuvem | Exibir a capacidade total da nuvem e a quantidade em uso.                                                                                            |
| Estatísticas           | Fornecer estatísticas sobre casos com base no estado do trabalho.                                                                                    |
| Estado do pedido       | Fornecer estatísticas sobre casos com base no estado do pedido.                                                                                      |
| Gráfico                | Informações de trabalhos em gráfico por período.                                                                                                     |
| Tipo de dente          | Fornecer estatísticas sobre o número de escaneamentos e pedidos por informação de tratamento.                                                        |


## Medit Insights

O Medit Insights é um serviço de geração de relatórios que ajuda a analisar suas estatísticas de uso.

### Observação

O serviço a seguir não está disponível no Medit Link China.

- Medit Insights

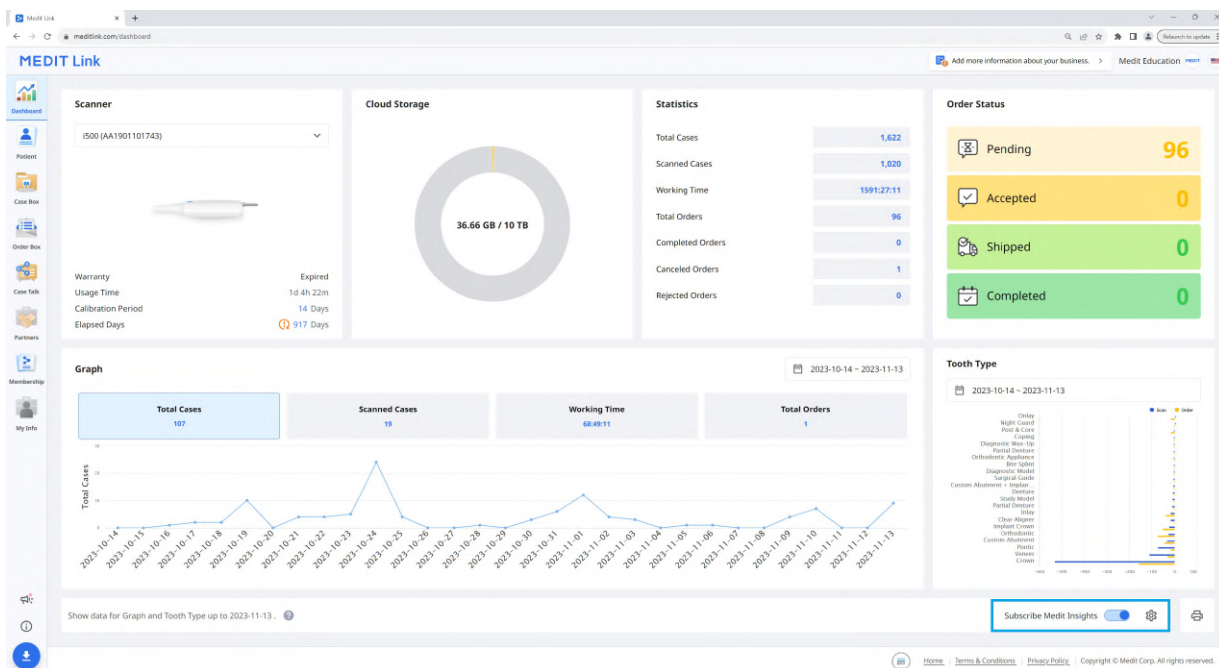

## Inscriver-se no Medit Insights

Você pode receber um e-mail de relatório no segundo dia de cada mês. Não é necessário nenhum processo de inscrição adicional. Basta ativar "Inscriver-se no Medit Insights".

Se você não usar o endereço de e-mail usado para a conta do Medit Link, poderá definir outro endereço de e-mail para receber o Medit Insights.

### Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account
   
☐ Another email address
 

Enter another email address to receive the report email.

*The report will be sent on the 2nd day of every month.*

Cancel
OK

No segundo dia de cada mês, você receberá um e-mail com as estatísticas, como mostrado abaixo.

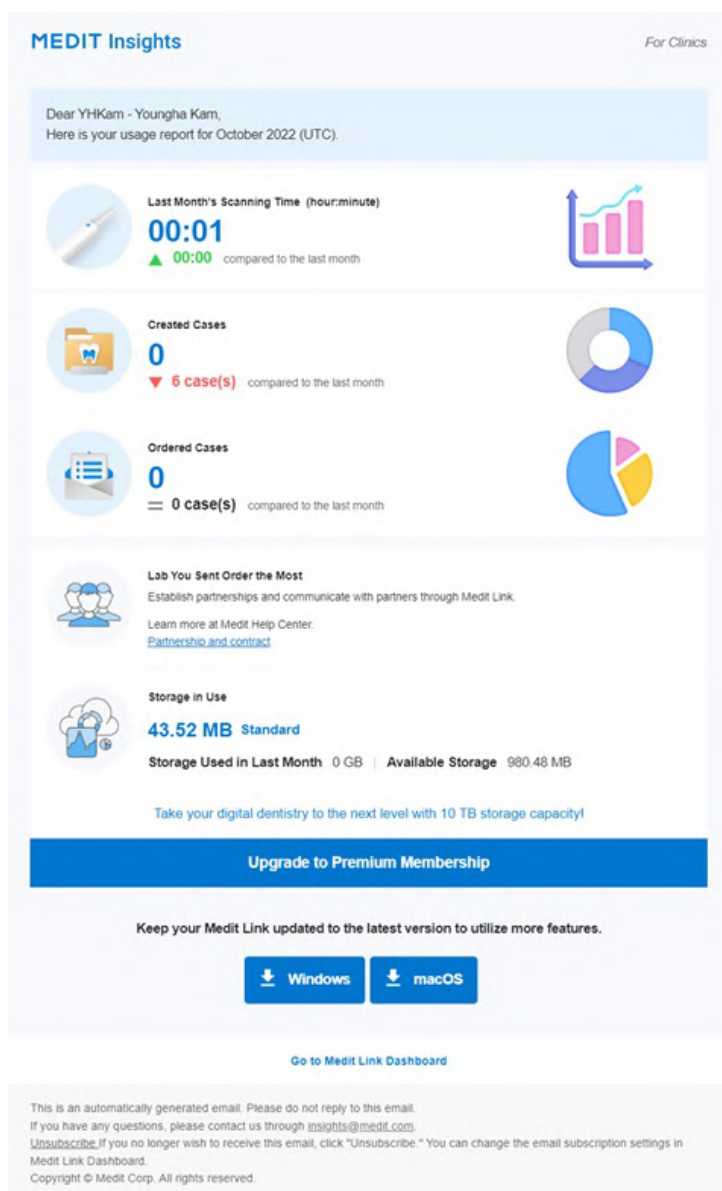

|                          |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banner                   | A Medit fornece dicas e informações úteis aqui.<br>* Se você não quiser ver o banner, desmarque a caixa de seleção Contrato de marketing e promoção em Minhas informações > Minha conta. |
| Informações estatísticas | As informações de estatísticas são exibidas, como tempo de escaneamento, casos criados, laboratório com mais pedidos, etc.                                                               |
| Download do Medit Link   | O botão fornece o link de download do Medit Link.                                                                                                                                        |
| Dashboard                | Todas as informações estatísticas se baseiam nas informações do seu Dashboard. É possível ver mais detalhes no Dashboard.                                                                |

## Cancelar inscrição no Medit Insights

Desative "Inscrever-se no Medit Insights" no Dashboard ou clique em "Cancelar inscrição" no e-mail recebido.

# Patient

Você pode gerenciar casos com base no nome e ID do paciente.

Todos os pacientes registrados pelo aplicativo Medit Link são mostrados em uma lista, facilitando o gerenciamento deles e de seus casos.

| Patient Name       | Patient ID     | Date of Birth | Gender | Number of Cases | Last Scan Date   | Last Modified Date | Registration Date |
|--------------------|----------------|---------------|--------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 159                | 121            | 1212-12-04    | ♂      | 1               | -                | 2025-02-13 16:17   | 2019-01-29 14:12  |
| BLATRIX Charline   | d82cb01f1e1... | 1986-01-05    | -      | 2               | 2025-01-06 18:28 | 2025-02-13 16:17   | 2025-01-13 15:07  |
| hik.lee            | -              | -             | -      | 1               | -                | 2025-02-12 15:23   | 2022-04-18 20:06  |
| TEST               | -              | -             | -      | 1               | -                | 2025-02-12 09:35   | 2025-02-11 17:17  |
| BLATRIX Charline   | d82cb01f1e1... | 1986-01-05    | -      | 1               | 2025-01-06 18:28 | 2025-02-10 18:22   | 2025-01-14 12:17  |
| exocad form only   | -              | -             | -      | 1               | -                | 2025-02-09 12:06   | 2025-02-09 12:06  |
| 240625 엔티스 스캔배디 매칭 | -              | -             | -      | 2               | 2024-06-25 15:14 | 2024-07-09 10:21   | 2024-07-09 10:21  |
| m                  | -              | -             | -      | 0               | -                | 2024-04-16 11:16   | 2024-04-16 11:16  |
| 3.3.0.136 TEST     | -              | -             | -      | 1               | -                | 2024-04-12 15:17   | 2024-04-12 15:17  |
| 3.3.0 STAGE TEST   | -              | -             | -      | 1               | -                | 2024-04-09 14:58   | 2024-04-09 14:58  |

## Pesquisar paciente

1. Selecione seus critérios de pesquisa entre Nome do paciente ou ID do paciente no menu suspenso no canto superior direito da lista de pacientes.

View Options

Patient ID ^ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Insira o nome ou ID do paciente para pesquisar de acordo com os critérios de pesquisa selecionados.
3. Somente pacientes com o nome ou ID do paciente inserido são exibidos na lista.

## Case Box/Work Box

O Case Box (Clinic) ou Work Box (Lab) mostra todos os casos que o usuário criou no aplicativo Medit Link. Você pode ver os arquivos por meio de um navegador da Web sem instalar um programa separado.

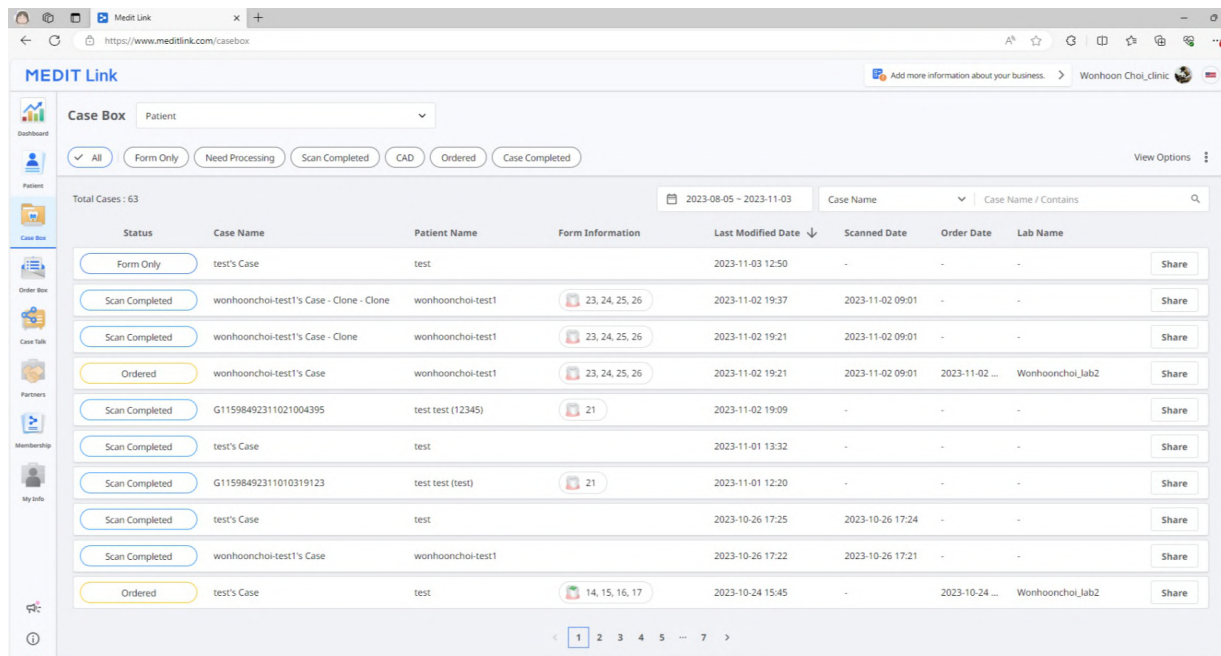


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo and a user profile. Below the header, there's a sidebar with navigation icons. The main area is titled 'Case Box' and features a dropdown menu set to 'Patient'. Below this, there are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A 'View Options' link is also present. The table below shows a list of cases with columns for Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table is paginated, showing 1 to 7 items.

| Status         | Case Name                                | Patient Name      | Form Information | Last Modified Date | Scanned Date     | Order Date     | Lab Name         |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| Form Only      | test's Case                              | test              |                  | 2023-11-03 12:50   | -                | -              | -                |
| Scan Completed | wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone | wonhoonchoi-test1 | 23, 24, 25, 26   | 2023-11-02 19:37   | 2023-11-02 09:01 | -              | -                |
| Scan Completed | wonhoonchoi-test1's Case - Clone         | wonhoonchoi-test1 | 23, 24, 25, 26   | 2023-11-02 19:21   | 2023-11-02 09:01 | -              | -                |
| Ordered        | wonhoonchoi-test1's Case                 | wonhoonchoi-test1 | 23, 24, 25, 26   | 2023-11-02 19:21   | 2023-11-02 09:01 | 2023-11-02 ... | Wonhoonchoi_Lab2 |
| Scan Completed | G11598492311021004395                    | test test (12345) | 21               | 2023-11-02 19:09   | -                | -              | -                |
| Scan Completed | test's Case                              | test              |                  | 2023-11-01 13:32   | -                | -              | -                |
| Scan Completed | G11598492311010319123                    | test test (test)  | 21               | 2023-11-01 12:20   | -                | -              | -                |
| Scan Completed | test's Case                              | test              |                  | 2023-10-26 17:25   | 2023-10-26 17:24 | -              | -                |
| Scan Completed | wonhoonchoi-test1's Case                 | wonhoonchoi-test1 |                  | 2023-10-26 17:22   | 2023-10-26 17:21 | -              | -                |
| Ordered        | test's Case                              | test              | 14, 15, 16, 17   | 2023-10-24 15:45   | -                | 2023-10-24 ... | Wonhoonchoi_Lab2 |

## Filtragem de caso

### Filtrar por paciente

É possível filtrar casos por pacientes. É útil quando você encontra casos de pacientes específicos.

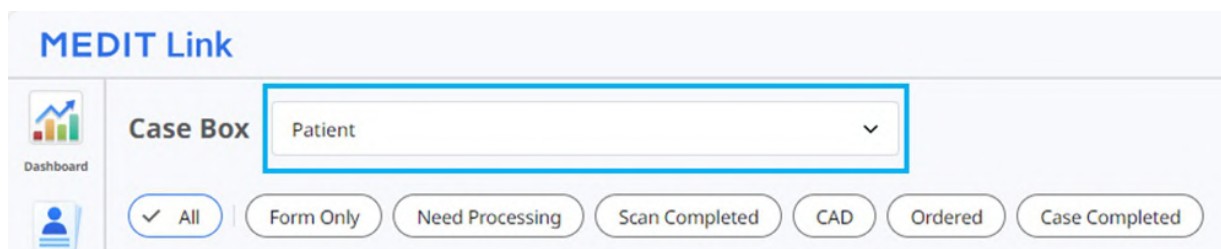

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' dropdown menu is highlighted with a red box, and it is set to 'Patient'. Below the dropdown, there are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Insira um nome de paciente no campo de pesquisa.

Patient

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test\_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. Selecione um paciente na lista de resultados da pesquisa.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test\_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

**Selected Patients**


[Clear Selection](#)

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -


☒ test / - / - / -

3. Apenas os casos dos pacientes selecionados são mostrados na lista, facilitando a localização dos casos com os quais você deseja trabalhar.

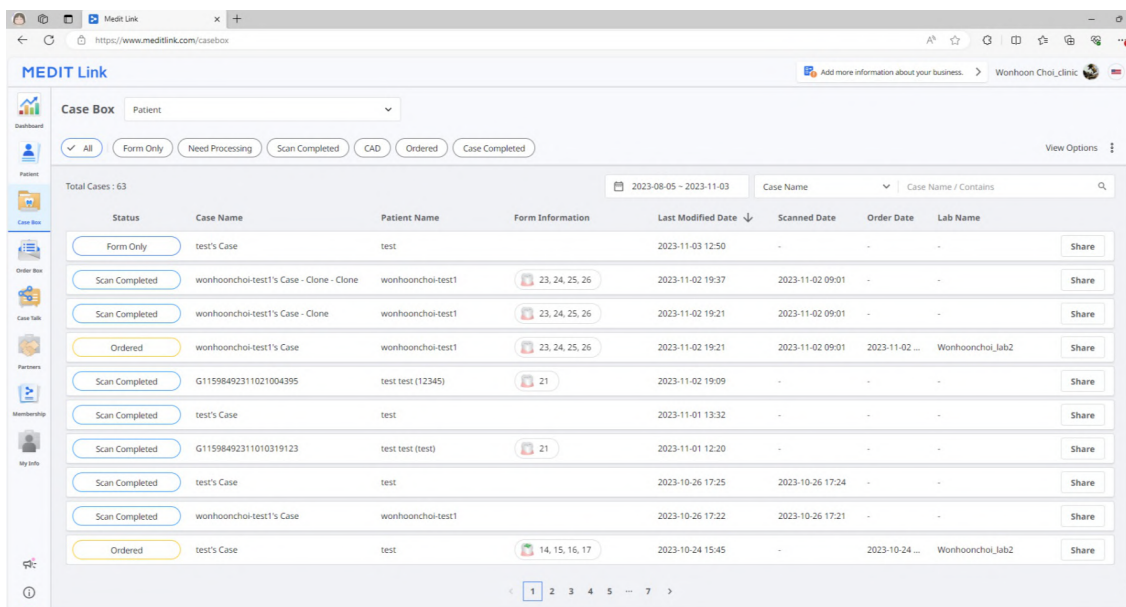

## Filtrar por estado

É possível filtrar casos com base no seu estado.

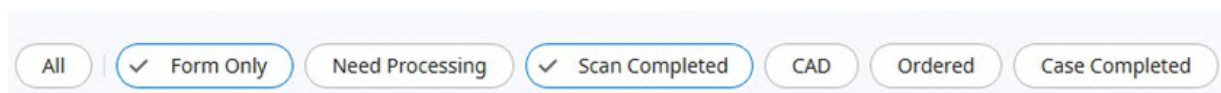

- O usuário pode clicar no estado que deseja visualizar. O navegador exibirá apenas casos no estado escolhido.
- O usuário pode selecionar vários estados de uma só vez.

Os seguintes tipos de estado são fornecidos com base no tipo de conta:

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Case Box (Clinic) | All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed |
| Work Box (Lab)    | All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done                     |


## Filtrar por duração

Você pode filtrar e exibir casos que foram modificados pela última vez no período definido.

1. Clique no filtro de duração.



2. Selecione o intervalo.

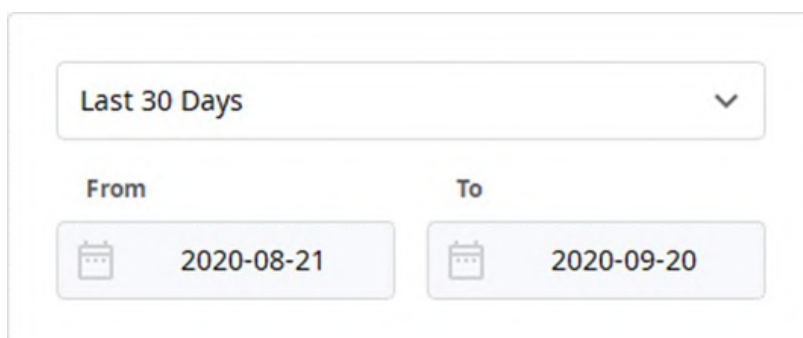

- Todos: Exibe todos os casos.
- Intervalo personalizado: Especifica as datas de início e término para exibir casos modificados dentro desse período.
- Hoje: Exibe casos modificados pela última vez hoje.
- Ontem: Exibe casos modificados pela última vez com a data de ontem.
- Últimos 7 dias: Exibe casos modificados pela última vez nos últimos 7 dias, exceto hoje.
- Últimos 30 dias: Exibe casos modificados pela última vez nos últimos 30 dias, exceto hoje.
- Últimos 90 dias: Exibe casos modificados pela última vez nos últimos 90 dias, exceto hoje.
- Este mês: Exibe casos deste mês.
- Mês anterior: Exibe casos do mês anterior.

A lista de casos será atualizada em tempo real com os casos criados ou modificados pela última vez dentro da duração selecionada.

## Filtrar por pesquisa

Você pode aproveitar os recursos de pesquisa para pesquisar as informações necessárias com facilidade e rapidez.

Case Name ▾


Case Name / Contains

🔍

As seguintes opções de pesquisa são fornecidas com base no tipo de conta:

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Case Box (Clinic) | Nome do caso, Nome do paciente, ID do paciente, Nome do laboratório |
| Work Box (Lab)    | Nome do caso, Nome do paciente, Nome da clínica, ID do pedido       |

## Detalhes do caso

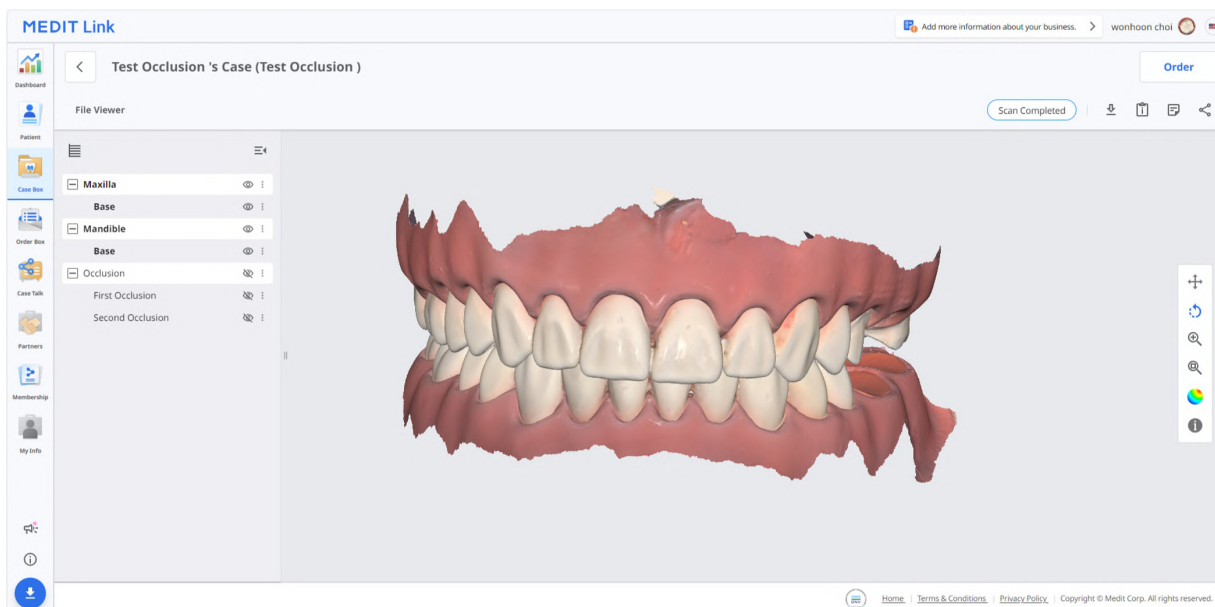


As seguintes funções de gerenciamento de caso são fornecidas na Case Box/Work Box.

|                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Estado do caso            | Exibe o estado do caso.                                                                                                                                                                 |
|  | Acesse a Order Box/In Box | Fornece um atalho para o mesmo caso em outra caixa (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).                                                                                           |
|  | Download                  | Faz o download dos arquivos no caso para o PC local.                                                                                                                                    |
|  | Informações sobre o caso  | Revisa os detalhes do caso e os salva como PDF ou os imprime.                                                                                                                           |
|  | Notas e etiquetas         | Adiciona uma nota ou etiquetas ao registrar ou fazer o pedido de um caso. Use-as para comunicar qualquer informação adicional ou complementar sobre o caso aos seus parceiros.          |
|  | Compartilhar              | Cria um link para compartilhamento.<br>Os usuários com o link compartilhado podem acessar os dados 3D em um navegador como Chrome, Firefox ou Safari sem instalar programas adicionais. |

## Order Box/In Box

O Order Box (Clinic) ou In Box (Lab) mostra os casos pedidos no aplicativo Medit Link.

## Detalhes da encomenda

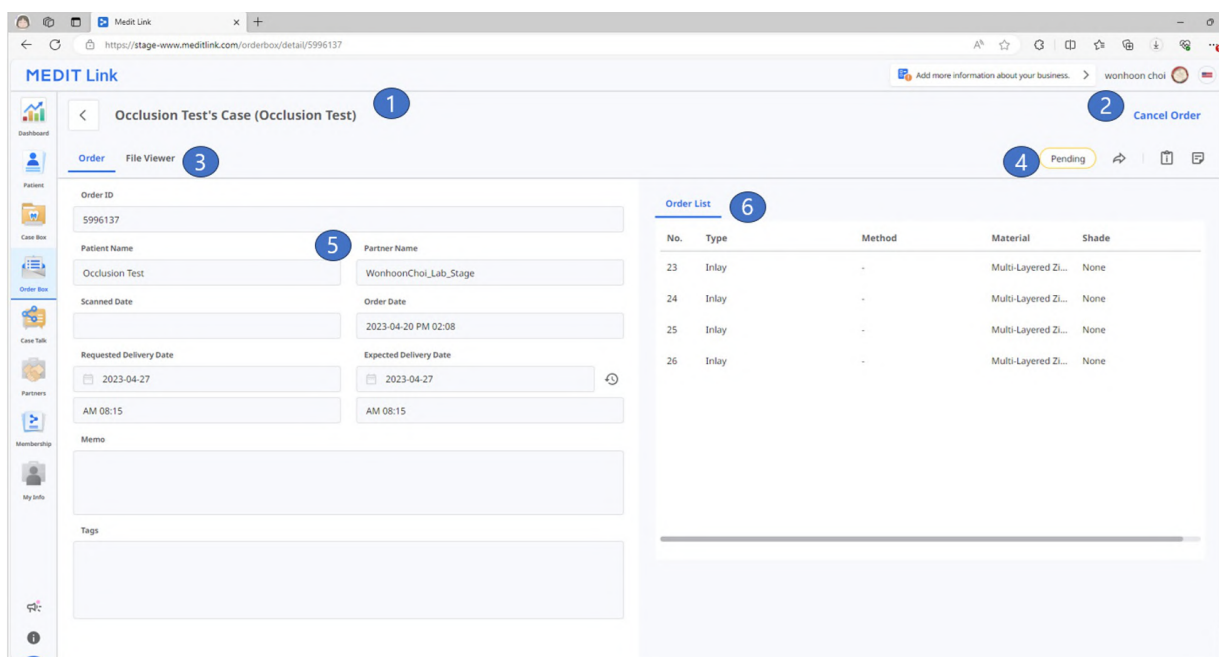

- |   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Exibe os nomes do caso e do paciente.                                                                                                                                            |
| 2 | Fornecer funções para gestão de pedidos (aceitar/cancelar; entregar/receber).                                                                                                    |
| 3 | Exibe as guias disponíveis: Pedido, Visualizador de arquivos.                                                                                                                    |
| 4 | Exibe funções para gerenciar casos e arquivos: estado do caso, atalhos para informações detalhadas, informações do caso, notas e etiquetas, etc.                                 |
| 5 | Exibe as informações detalhadas do pedido, incluindo número do pedido, nome do paciente, nome da conta, data de escaneamento, data do pedido, data de entrega, nota e etiquetas. |
| 6 | Exibe as informações do produto pedido e o estado de entrega.                                                                                                                    |


## Guias em Order Box/In Box

| Pedido                                                                                                                                                                      | Visualizador de arquivos                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifique as informações detalhadas do pedido, como ID do pedido, nome do paciente, nome da conta, data de escaneamento, data do pedido, data de entrega, nota e etiquetas. | Visualize arquivos gerados por operações de escaneamento/CAD. O visualizador de arquivos exibe e gerencia os modelos 3D adquiridos ou anexados e imagens 2D. |

# Case Talk

Os casos criados no Medit Link podem ser compartilhados com pessoas específicas que você determinar, com qualquer pessoa com o link compartilhado ou com membros registrados do Medit Link.

O usuário pode ver uma lista de todos os casos compartilhados no "Case Talk" do aplicativo Medit Link e do Medit Link Web.

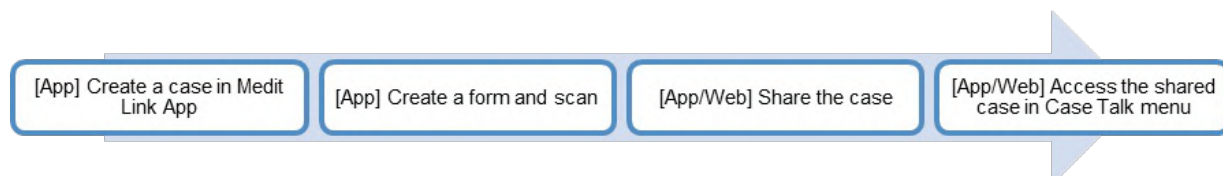


Casos compartilhados podem ser visualizados por meio de um navegador da web sem instalar um programa separado, permitindo uma comunicação fácil sobre os dados 3D em vários dispositivos.


## Criação de um Case Talk

Você pode criar um link compartilhado para um caso criado no Case Box/Work Box.

1. Encontre um caso que deseja compartilhar e clique no botão "Compartilhar" à direita.

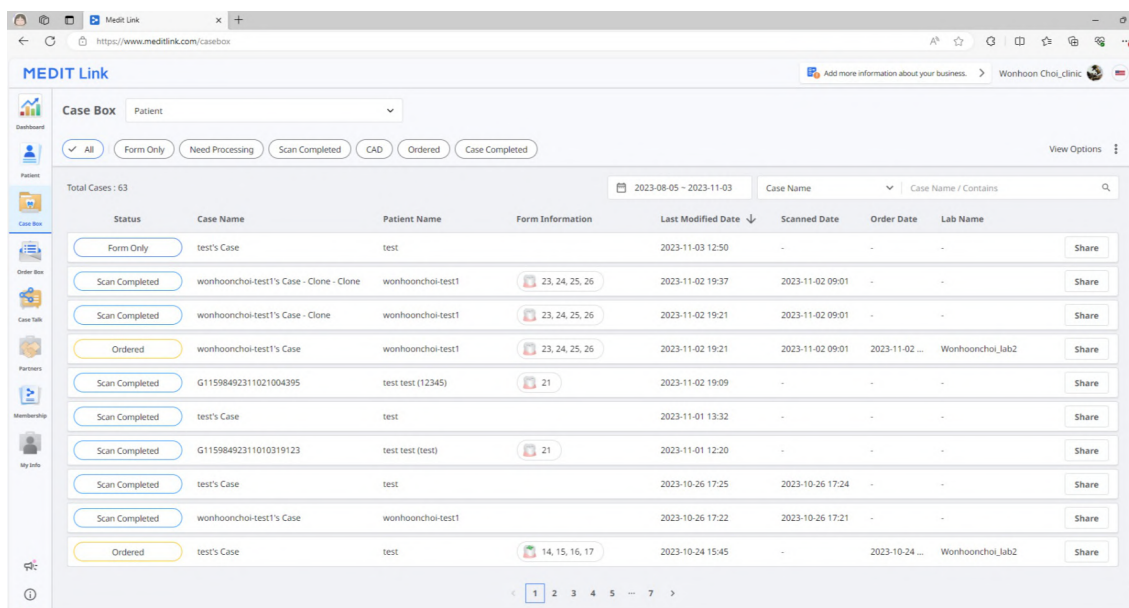

2. Selecione os arquivos que deseja compartilhar.

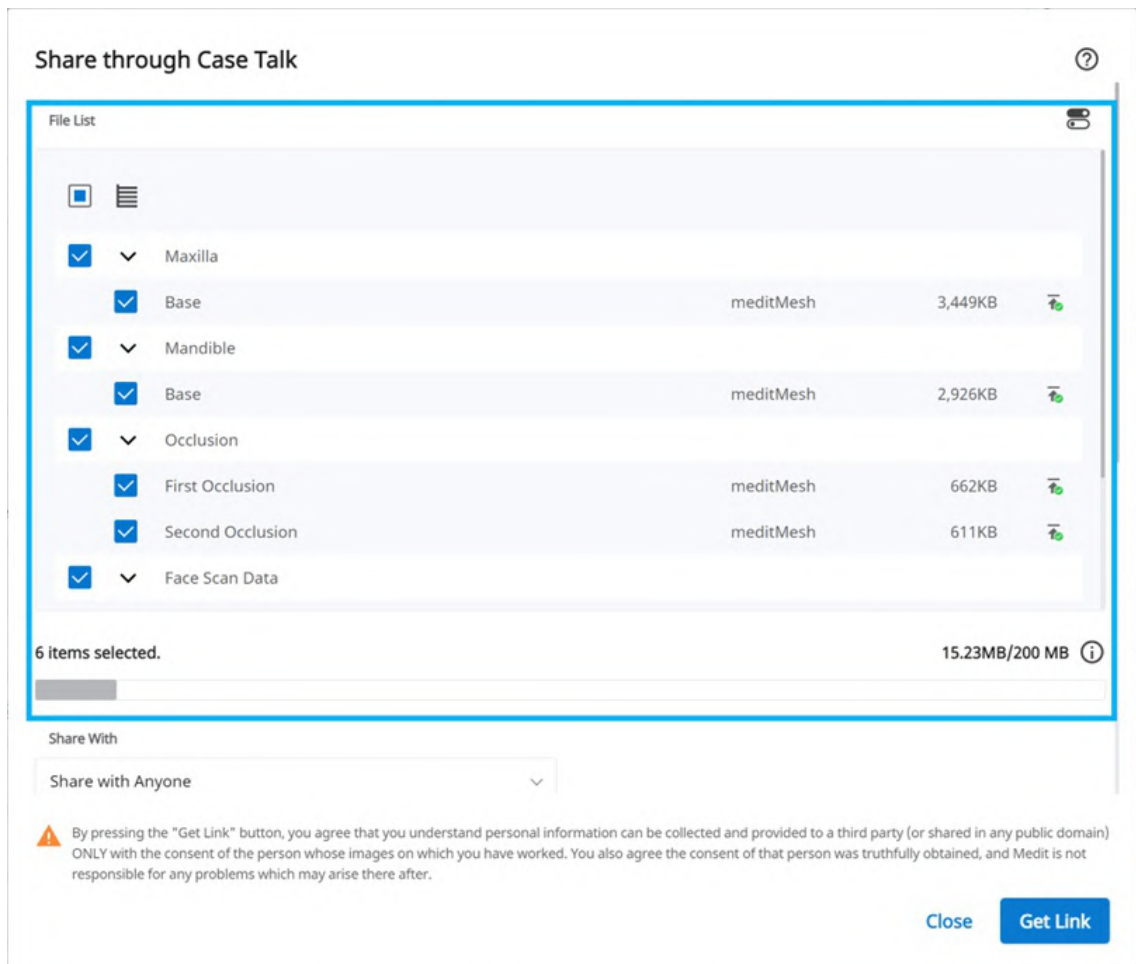

3. Defina o tipo de permissão de compartilhamento e as opções de compartilhamento.
4. Clique em "Obter link" para criar um link compartilhado.

## Definição do tipo de permissão de compartilhamento e das opções de compartilhamento

## Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Share via

✉

+

☰

📘

Create a shared link and share it with specific people.

📅

Expiration Date

2022-06-28

📘

You can extend the period up to 90 days from today.

🔒

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

📘

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

✓

Share the patient's name

✓

Grant Download Permission [Premium Feature](#)

📘

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

📘

The premium feature is provided to all users for a limited time.  
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

✓

Allow comments

📘

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

⚠

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close

Get Link

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compartilhar com</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartilhar com qualquer pessoa<br/>Cria um link compartilhado. É possível compartilhar os arquivos com qualquer pessoa.</li> <li>• Compartilhar com pessoas em específico<br/>Cria e envia um link compartilhado para pessoas específicas.</li> </ul> |
| <b>Compartilhar via</b>                | <p>Se você selecionar "Compartilhar com pessoas em específico", poderá compartilhar o link com pessoas específicas de várias maneiras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endereço de e-mail</li> <li>• SMS</li> <li>• Partners</li> </ul>                                             |
| <b>Data de validade</b>                | Define a data de validade do link. Depois que passar a data de validade do link, as pessoas com quem você o compartilhou não poderão mais acessar os arquivos. Você pode prorrogar o período de validade por até 90 dias a partir da data atual.                                                 |
| <b>Código PIN</b>                      | Define um código de acesso de seis dígitos para garantir a segurança dos dados.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Compartilhar o nome do paciente</b> | Se você marcar essa opção, todas as pessoas com o link verão o nome do paciente.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Conceder permissão de download</b>  | Caso você marque essa opção, todos os usuários com o link compartilhado poderão fazer download dos arquivos.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Permitir comentários</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se você marcar esta opção, você conseguirá se comunicar através do link compartilhado.</li> <li>• Se você desmarcar a opção, o destinatário só poderá visualizar seus comentários, mas não conseguirá adicionar os próprios comentários.</li> </ul>     |
| <b>Comentário</b>                      | Você pode deixar uma mensagem na seção de comentário.                                                                                                                                                                                                                                            |

## Detalhes do Case Talk

Você pode ver os arquivos no caso compartilhado. As funções a seguir estão disponíveis na página de detalhes do Case Talk.

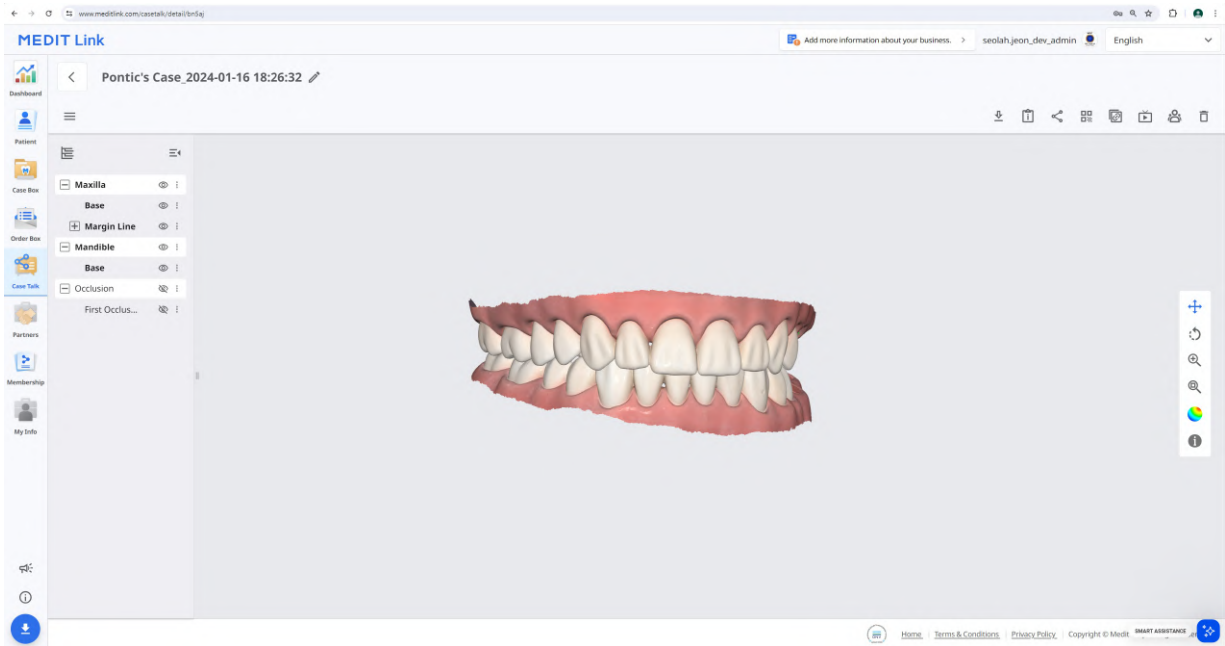

|                                                                                     |                          |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Download                 | Faz o download de todos os arquivos do caso para o PC local.                                                                       |
|  | Informações sobre o caso | Exibe informações detalhadas sobre o caso.                                                                                         |
|  | Compartilhar             | Modifica a configuração do compartilhamento.                                                                                       |
|  | Código QR                | Compartilhe o caso com um código QR.                                                                                               |
|  | Copiar link              | Copia o link compartilhado para a área de transferência. O link copiado mostra os arquivos compartilhados em seu navegador da web. |
|  | Live                     | Compartilha a sua tela com os usuários conectados.<br>O compartilhamento da tela é sincronizado com os usuários conectados.        |
|  | Participantes            | Mostra todos os usuários que estão acessando o link compartilhado.                                                                 |
|  | Excluir                  | Exclui o link compartilhado. O link compartilhado excluído deixa de estar acessível.                                               |

#### Observação


Os serviços a seguir não estão disponíveis no MEDIT Link China.

- Live
- Participantes

## Web Viewer

Você pode visualizar dados compartilhados pelo Case Talk em um navegador da web.

É possível se comunicar com as pessoas que têm acesso ao link usando anotações e comentários.

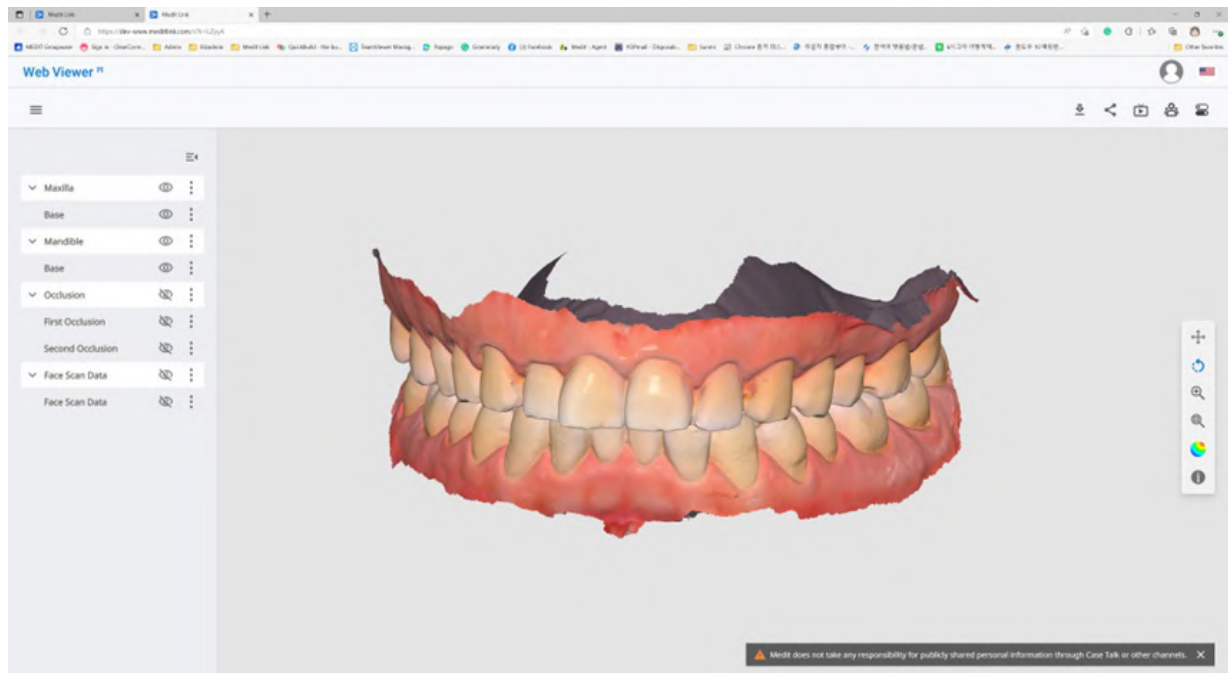

|                                                                                     |                          |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Download                 | Fazer o download de todos os arquivos neste caso para o PC.                                                                 |
|  | Informações sobre o caso | Exibe informações detalhadas sobre o caso.                                                                                  |
|  | Compartilhar             | Modifica as configurações do compartilhamento.                                                                              |
|  | Código QR                | Compartilhe o caso com um código QR.                                                                                        |
|  | Live                     | Compartilha a sua tela com os usuários conectados.<br>O compartilhamento da tela é sincronizado com os usuários conectados. |
|  | Participantes            | Mostra todos os usuários que estão conectados ao link compartilhado.                                                        |
|  | Rotulagem dentária       | Altera o sistema de rotulagem dentária.                                                                                     |


#### Observação

Os serviços a seguir não estão disponíveis no Medit Link China.

- Live
- Participantes

## Anotação

Você pode adicionar anotações a um local especificado no modelo 3D. Qualquer pessoa com o link pode visualizar as anotações que você adicionar.

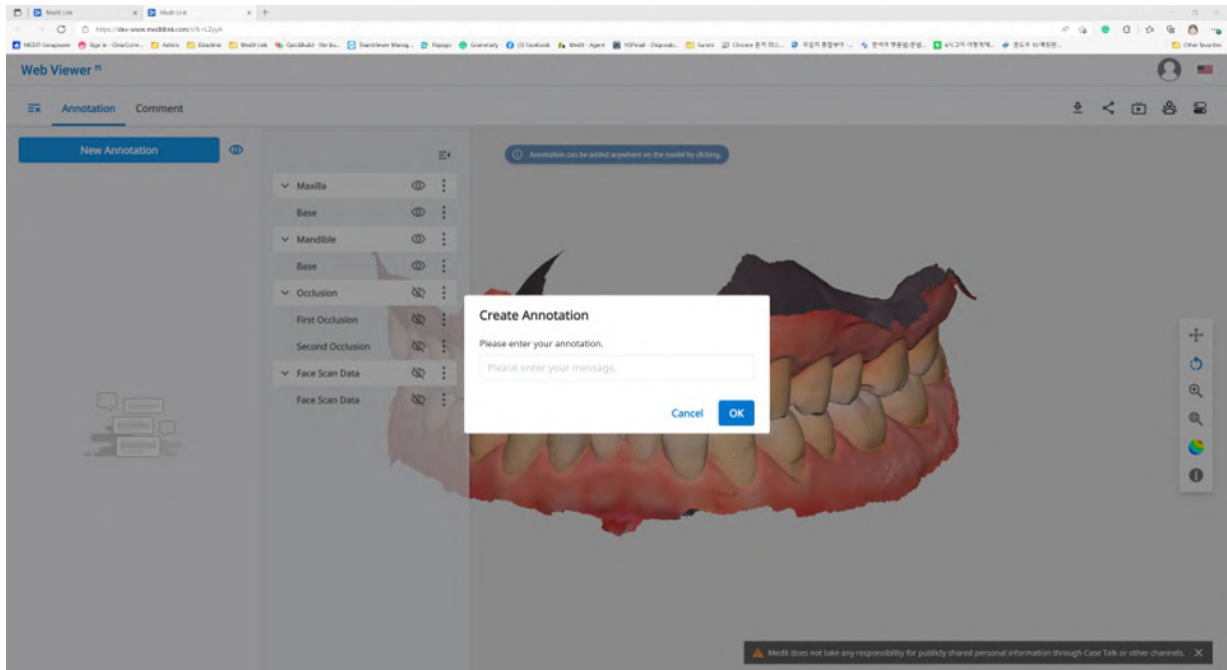


## Observação


O serviço a seguir não está disponível no Medit Link China.

- Anotação

1. Encontre o ícone do menu no canto superior esquerdo e selecione a guia "Anotação". Use o botão "Nova anotação" para adicionar uma anotação em qualquer lugar nos dados, com um clique.
2. Digite a mensagem e clique em "OK" para salvá-la.

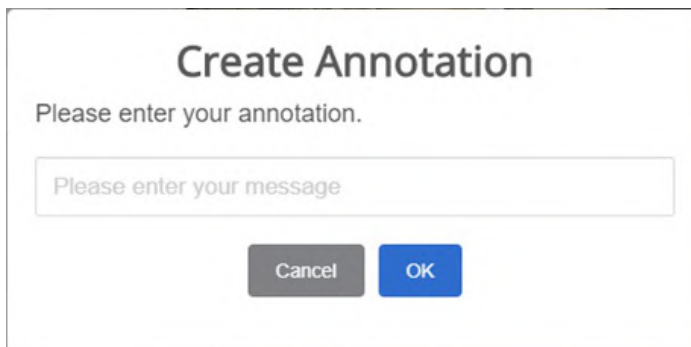A screenshot of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title 'Create Annotation' and a prompt 'Please enter your annotation.' Below this is a text input field with the placeholder 'Please enter your message'. At the bottom are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. Você pode usar as anotações como um canal de comunicação simples. Clique na anotação criada para inserir uma resposta e clique em "Enviar".

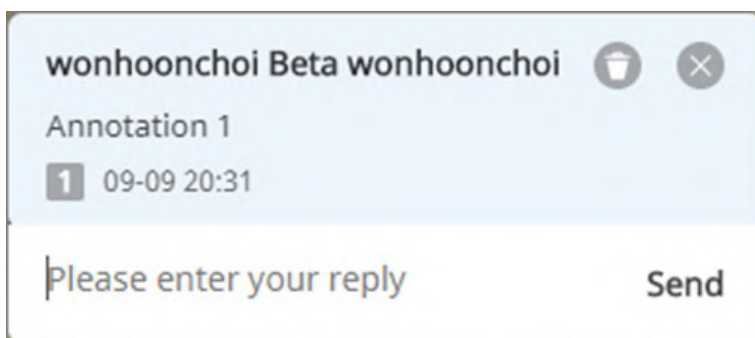A screenshot of the annotation chat interface. It shows a header with the name 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' and icons for delete and close. Below is the title 'Annotation 1' and a timestamp '1 09-09 20:31'. At the bottom is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

## Comentários

Você pode se comunicar com os usuários que têm acesso ao link por meio da guia "Comentário" no menu do Web Viewer.

### Observação

O serviço a seguir não está disponível no Medit Link China.

- Comentário

## Compartilhamento de tela em tempo real

Você pode compartilhar sua tela em tempo real.

### Observação

O serviço a seguir não está disponível no Medit Link China.

- Live

1. Clique em "Live" para compartilhar sua tela do Web Viewer com os usuários conectados.




2. Clique em "OK" para começar a compartilhar a sua tela.
3. Outras pessoas que acessaram o link devem aceitar o compartilhamento de tela.
4. A tela do usuário que iniciou o compartilhamento de tela é exibida em sincronia com a tela da pessoa que recebeu a solicitação.


## Árvore de dados

Todos os dados são agrupados e exibidos de acordo com os atributos na árvore de dados. É possível exibir ou ocultar dados, ajustar a opacidade e assim por diante.

## Controles da árvore de dados
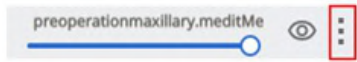
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exibir / Ocultar | Clique no ícone de "olho" para exibir ou ocultar os dados da exibição. Controle a visibilidade dos dados como grupo ou como arquivo individual.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opacidade        | <p>Passe o mouse sobre um elemento visível para ver a barra deslizante de opacidade.</p> <p>Ajuste a barra deslizante para alterar a transparência de seus dados.</p>                                                                                                                          |
| Menu estendido   | <p>O menu estendido é fornecido à direita de cada elemento da Árvore de dados. Ele inclui as seguintes opções:</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibir somente este: Oculta todos os outros dados, exceto os dados atuais.</li> <li>• Ocultar: Oculta os dados atuais.</li> </ul> |

## Controles de modelo 3D
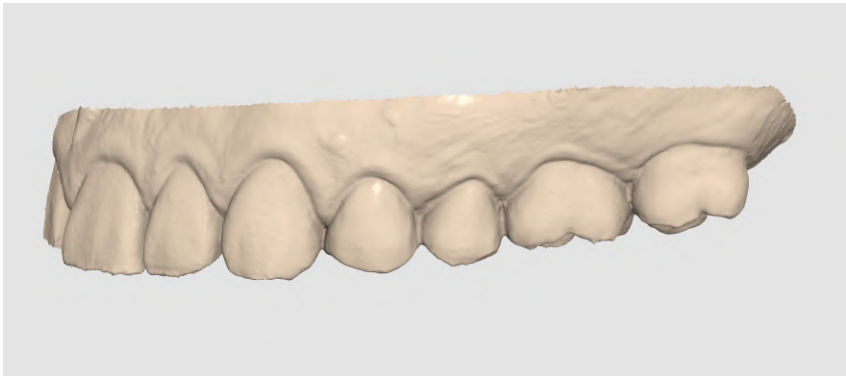
|   |                            |                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • | Panorâmico                 | Move o modelo.                                                                                                                                                 |
| ◦ | Rotacionar                 | Rotaciona o modelo.                                                                                                                                            |
| ~ | Aumentar/Diminuir zoom     | Aumenta e diminui o zoom do modelo.                                                                                                                            |
| ⌂ | Ajuste de zoom             | Posiciona o modelo no centro da tela.                                                                                                                          |
| • | Modo de exibição dos dados | <p>Exibe os dados em cores com acabamento fosco (renderização Phong).</p>  |
| • |                            | <p>Exibe os dados em uma cor.</p>                                          |

# Partners

Você pode procurar parceiros em potencial para solicitar uma parceria e visualizar a lista de parceiros atuais.


## Observação

Os serviços que usam o Google Maps não estão disponíveis no Medit Link China.

## Procurar parceiros


É possível pesquisar usuários do Medit Link com base no nome e/ou endereço comercial.

Nos resultados da pesquisa, você pode enviar uma solicitação de parceria para uma empresa com a qual gostaria de trabalhar.

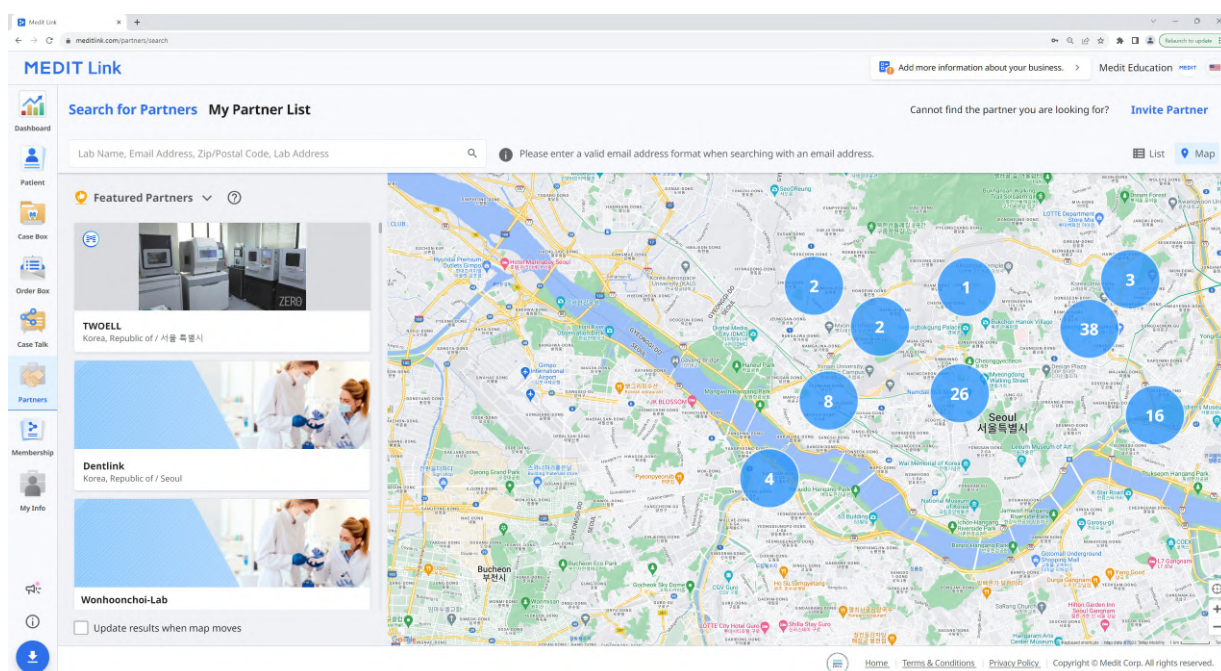

## Minha lista de parceiros

Você pode revisar suas parcerias atuais com todas as suas empresas parceiras existentes em Minha lista de parceiros.

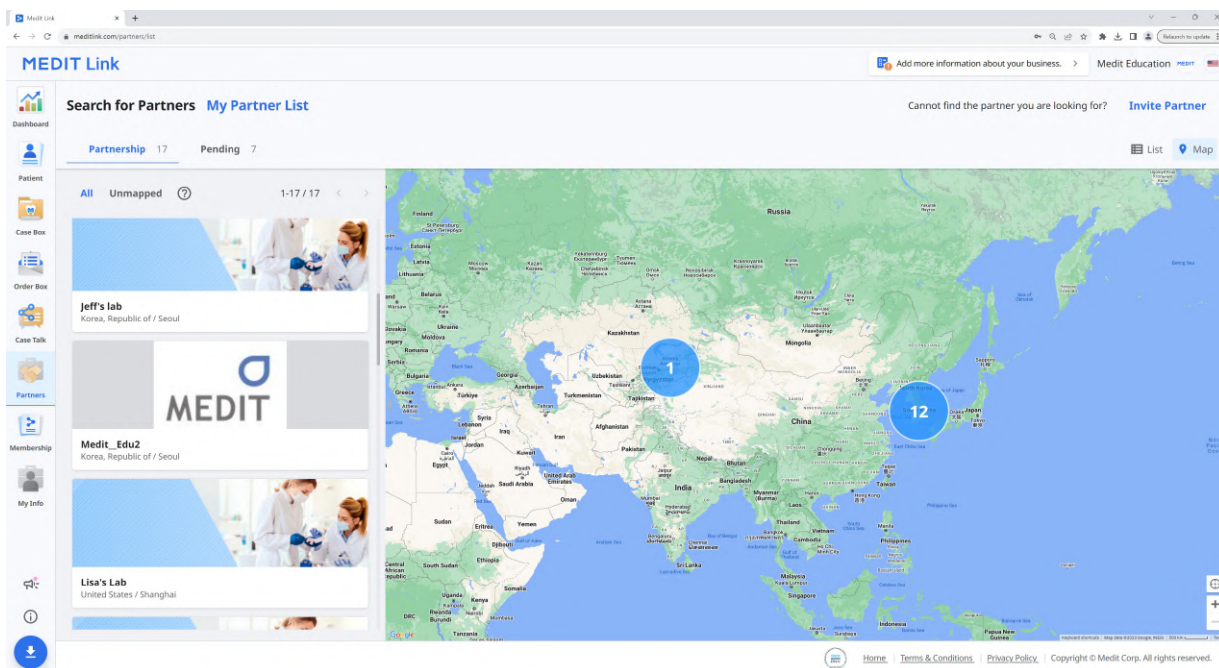

## Convite para parceiro

Se você tem uma clínica ou um laboratório com o qual deseja trabalhar, pode convidá-lo para juntar-se ao Medit Link. A parceria será formada automaticamente assim que ela aceitar o convite.

1. Clique em "Convidar parceiro" no canto superior esquerdo da tela.
2. Digite o endereço de e-mail da empresa com a qual deseja trabalhar e envie um convite com uma solicitação de parceria.



## Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

3. Assim que a organização convidada aceitar o convite e se cadastrar no Medit Link, a parceria será automaticamente estabelecida.

# Membership

## Assinatura

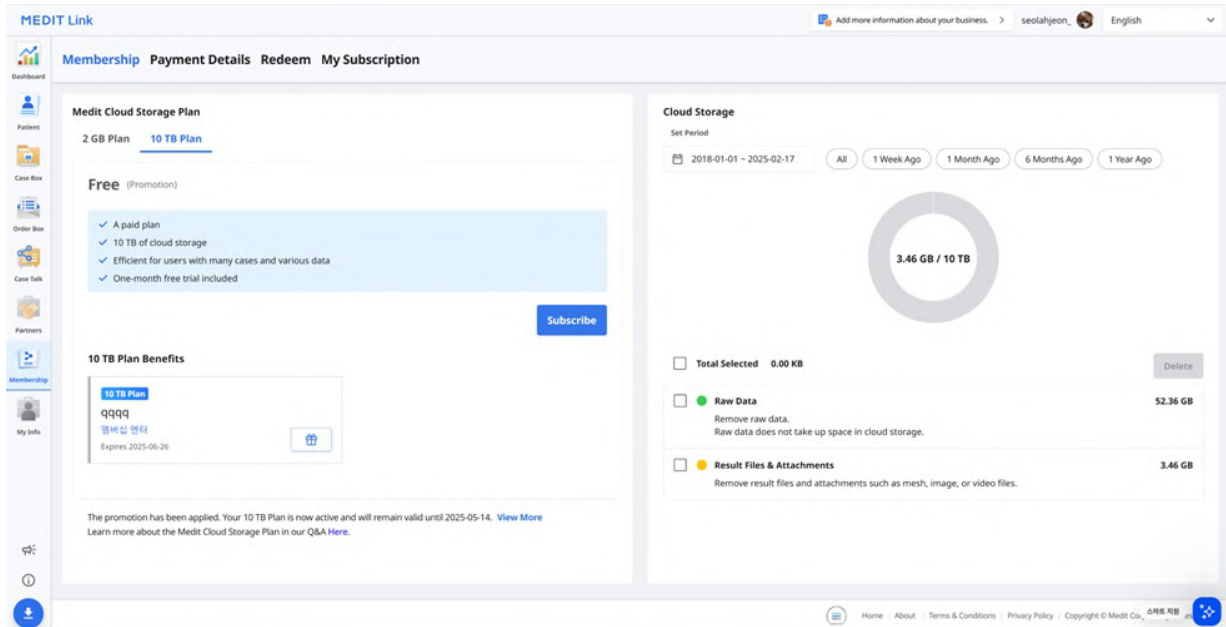

## Medit Cloud Storage Plan

Você poderá ver o que cada plano oferece, incluindo cupons e vouchers de desconto, e o estado atual da sua assinatura. Você pode atualizar seu plano ou cancelar sua assinatura a qualquer momento.

The screenshot shows the 'Medit Link' interface. On the left is a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership (highlighted), and My Info. The main content area is titled 'Membership' and includes tabs for 'Payment Details', 'Redeem', and 'My Subscription'. The 'Medit Cloud Storage Plan' section shows two options: '2 GB Plan' and '10 TB Plan' (selected). A 'Free (Promotion)' banner lists benefits: 'A paid plan', '10 TB of cloud storage', 'Efficient for users with many cases and various data', and 'One-month free trial included'. A 'Subscribe' button is present. Below, the '10 TB Plan Benefits' section features a '2 GB Plan' badge, the text 'AI Crown | Redefine Your Performance', 'Dentbird by Imagoworks', and 'Expires 2025-06-30'. At the bottom, a message states: 'The promotion has been applied. Your 10 TB Plan is now active and will remain valid until 2025-05-14. View More. Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A Here.'

O Medit Link fornece os seguintes planos de armazenamento em nuvem:

#### 2 GB Plan

- Plano padrão gratuito para todos os usuários cadastrados
- 2 GB de armazenamento em nuvem
- Para novos usuários

#### 10 TB Plan

- Plano pago
- 10 TB de armazenamento em nuvem
- Para usuários com muitos casos e vários dados
- Teste gratuito por um mês


|                                                                           | 2 GB Plan | 10 TB Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Armazenamento na nuvem                                                    | 2 GB      | 10 TB         |
| Assinatura mensal                                                         | Gratuito  | US\$ 9,99/mês |
| * O armazenamento em nuvem não conta os dados brutos no espaço utilizado. |           |               |

### Observação

Os planos de assinatura estarão disponíveis no Medit Link China. Você pode aproveitar o 10 TB Plan gratuitamente até o lançamento oficial do recurso.

## Armazenamento na nuvem

Na seção direita, você também pode gerenciar o armazenamento na nuvem.

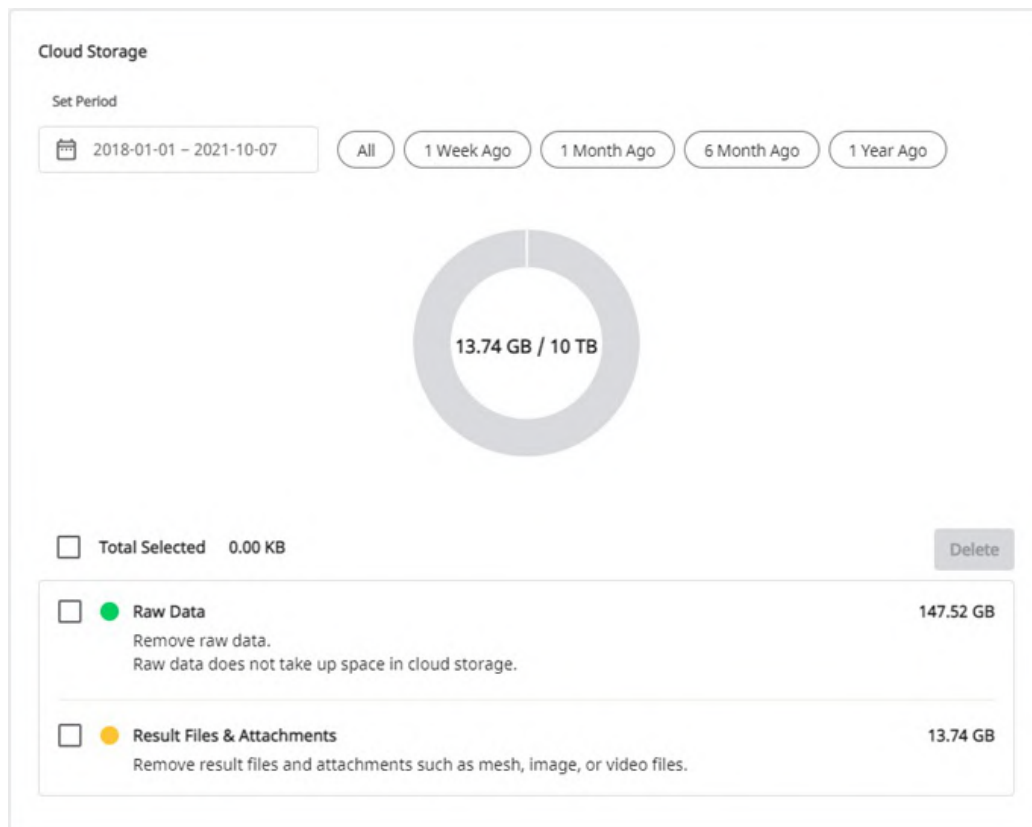

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definir período     | <p>Define o período específico para excluir os dados criados nesse intervalo de tempo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Todos: Veja todos os arquivos.</li><li>• Uma semana atrás: Veja os arquivos para os quais se passou uma semana desde a sua criação.</li><li>• Um mês atrás: Veja os arquivos para os quais se passou um mês desde a sua criação.</li><li>• Seis meses atrás: Veja os arquivos para os quais se passaram seis meses desde a sua criação.</li><li>• Um ano atrás: Veja os arquivos para os quais se passou um ano desde a sua criação.</li></ul> |
| Dados brutos        | <p>Os dados brutos não ocupam espaço no armazenamento em nuvem, portanto, não estarão no gráfico de pizza. Mas você pode gerenciar os dados brutos aqui, se necessário, por exemplo, excluí-los para proteger as informações privadas do paciente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resultados e anexos | <p>Os arquivos anexos e de resultado ocupam o espaço na nuvem. Se o armazenamento em nuvem estiver cheio, você poderá obter mais espaço de armazenamento removendo arquivos desnecessários.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Excluir             | <p>Remove os arquivos selecionados do armazenamento em nuvem para liberar espaço.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Inscriver-se

Se atualmente você estiver no 2 GB Plan ou no 10 TB Plan com um código de resgate, poderá assinar o 10 TB Plan.

O pagamento é concluído por meio do serviço Stripe ([www.stripe.com](https://www.stripe.com)).

1. Acesse Assinatura > Medit Cloud Storage Plan > 10 TB Plan e clique no botão "Inscrever-se".

#### Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan   **10 TB Plan**


**Free** (Promotion)

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

2. Verifique a descrição do 10 TB Plan e clique em "Inscrever-se" novamente.

### Subscribe Membership

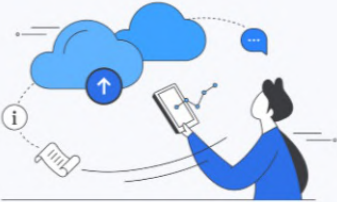

## 10 TB Plan

9.99\$ USD / Monthly

- ✓ Subscribe now to keep your 10 TB Plan after the promotion expires.
- ✓ You will pay a subscription fee after the current promotion expires. If you don't wish to pay, you can unsubscribe before payment.

\* VAT is not included.  
\* Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Cancel   **Subscribe**

3. Verifique o preço e as condições e insira as informações necessárias para o pagamento. Depois, clique em "Inscrever-se".



### Cancel Subscription



Are you sure you want to cancel your **10 TB Plan**?

✓ By confirming, you will automatically be switched to the free 2 GB Plan.  
Enjoy full access to the features and storage of your current plan through to 2025-02-20.

ⓘ Please note that all uploaded files will be retained regardless of the plan you choose.  
If your storage exceeds the 2 GB limit, you won't be able to upload new files.

\*Click [here](#) to learn more about our membership plans.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

3. Para confirmar que deseja cancelar a inscrição, clique em "Cancelar assinatura" novamente na nova janela pop-up.

### Confirm Subscription Cancellation

Your subscription will be canceled on 2025-02-20.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

4. A assinatura é cancelada.

### Confirm Subscription Cancellation


Your subscription has been canceled.  
You can use your current plan until 2025-02-20. After that, the cloud capacity will be limited to 2 GB.  
If the used space exceeds the limit, data will not be backed up, and functions such as Order and Share will not be available.

Close

5. Seu plano será alterado para o 2 GB Plan a partir do próximo dia de pagamento e o armazenamento em nuvem será limitado a 2 GB. Se a capacidade de armazenamento em nuvem for ultrapassada, não será feito o backup dos arquivos e as funções de pedido e compartilhamento não estarão disponíveis.

## Minha Assinatura

Você pode visualizar os detalhes da sua assinatura atual, renovar a assinatura ou cancelá-la em Minha assinatura. Você também pode alterar o método de pagamento, que será aplicado a partir do próximo pagamento agendado.

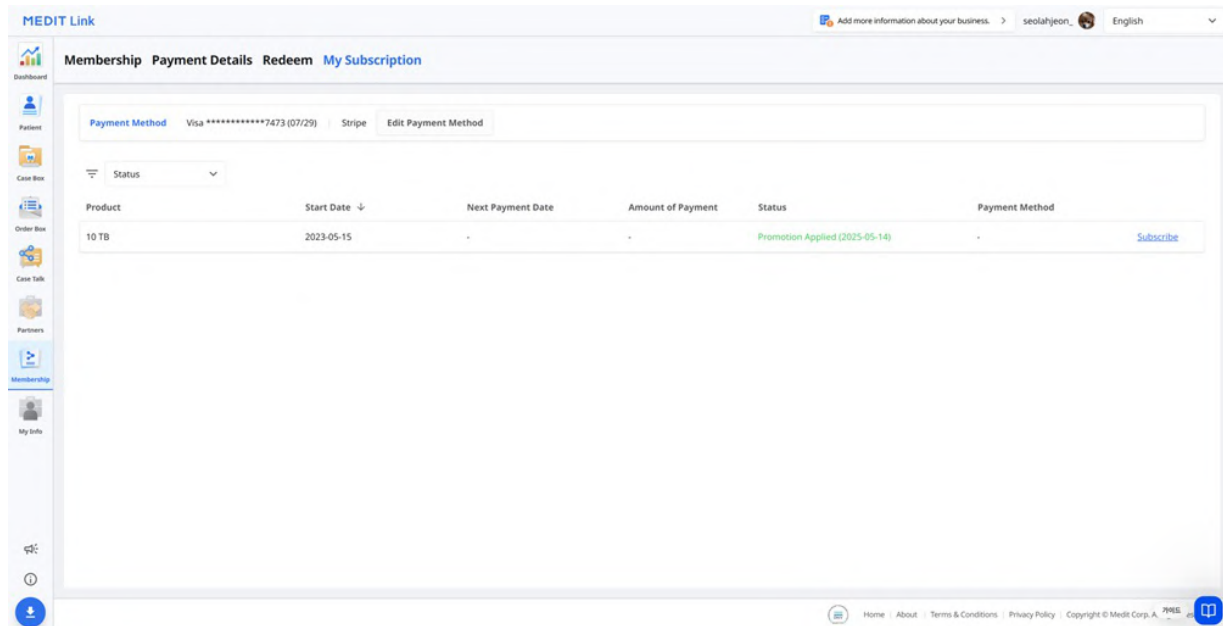

## Detalhes


| Item                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto                   | Exibe o tipo de assinatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Data de início            | Exibe quando a assinatura ou promoção começou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Próxima data de pagamento | Exibe a próxima data de pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valor do pagamento        | Exibe o valor do pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Estado                    | <p>Assinatura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativa: a assinatura está ativa.</li> <li>• Expirando: a assinatura não será renovada na próxima data de pagamento e será cancelada.</li> <li>• Expirada: a assinatura terminou.</li> </ul> <p>Promoção</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promoção aplicada: agora, o código promocional está ativo.</li> <li>• Promoção pendente: o código promocional aguarda ativação.</li> <li>• Promoção expirada: o código promocional expirou.</li> </ul> |
| Método de pagamento       | Exibe os últimos quatro dígitos do cartão utilizado para pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Renovar assinatura


| Item                              | Descrição                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Plano de armazenamento em nuvem   | Clique no botão de assinatura para renovar a assinatura do 10 TB Plan. |
| Plano de assinatura no aplicativo | Faça login no aplicativo para renovar a assinatura.                    |

## Como adicionar um método de pagamento

1. Clique em "Editar método de pagamento".

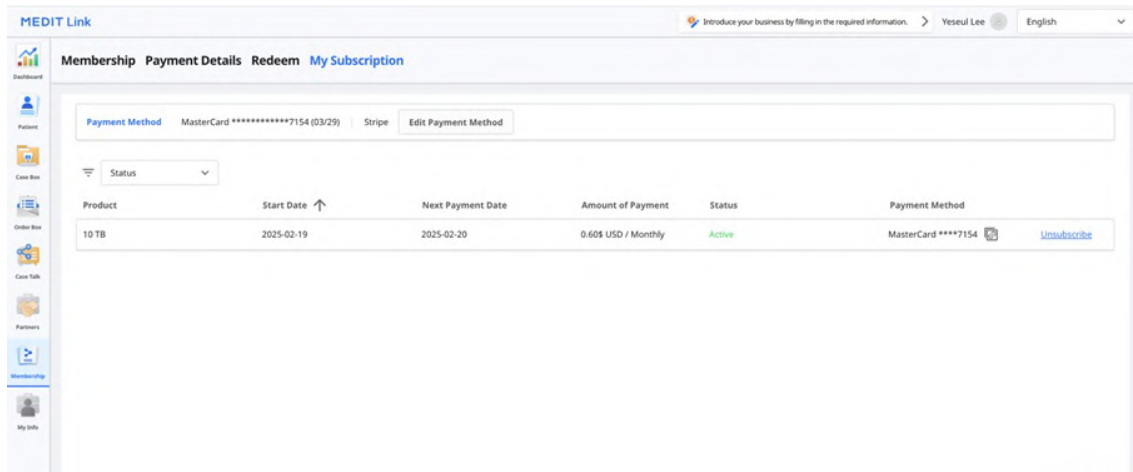

2. Clique em "Adicionar método de pagamento".

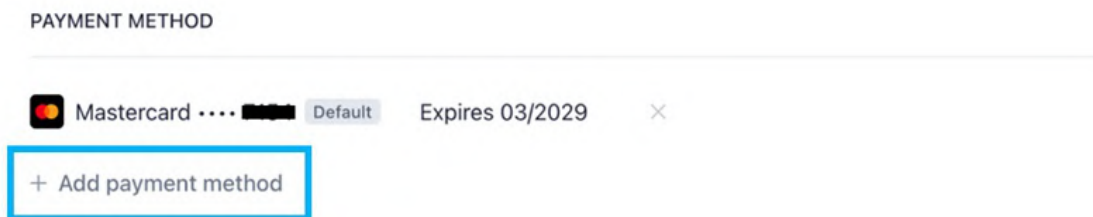

3. Insira as informações necessárias e clique em "Adicionar".

### Add payment method

Card number

1234 1234 1234 1234

Expiry date

MM / YY

Security code

CVC

Country

South Korea

By providing your card information, you allow Medit USA Inc to charge your card for future payments in accordance with their terms.

☒ Use as default payment method

Add

Go back

4. O método de pagamento recém-adicionado será definido como padrão e usado para o próximo pagamento.


#### PAYMENT METHODS



## Como alterar um método de pagamento

1. Clique no ícone do menu expandido ao lado do método de pagamento que deseja alterar na janela da caixa de diálogo de faturamento.

#### PAYMENT METHODS

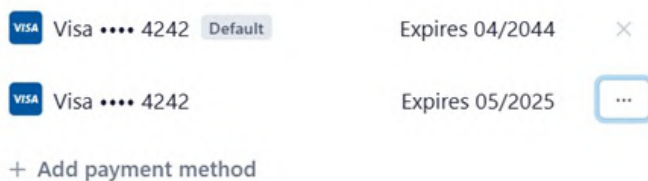

2. Clique em “Tornar padrão” para definir o cartão selecionado como o método de pagamento padrão.

#### CURRENT SUBSCRIPTION


[DEV] Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

**\$9.99 per day**

[View details](#) ▾

Your subscription renews on February 20, 2025.

#### PAYMENT METHODS

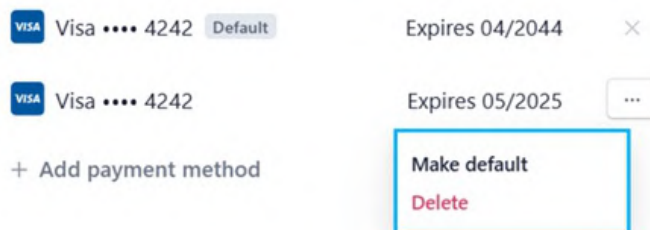

## Resgatar

Você pode resgatar um código promocional para acessar o 10 TB Plan gratuitamente.

## Detalhes

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

Add more information about your business. > seolah.jeon\_dev\_admin English

Membership Payment Details Redeem My Subscription

Register Redeem Code

Register

Redeem Code

All

|   | Product | Promotion                  | Code Number         | Registration Date | From       | To         | Status  |        |
|---|---------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|---------|--------|
| 4 | Premium | 4 Clinic Premium Promotion | 2A6F-0125-6747-4AB7 | 2022-03-16        | 2021-10-01 | 2021-10-05 | Waiting | Cancel |

< 1 >

| Item             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto          | Exibe o plano ao qual a promoção é aplicada.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Promoção         | Exibe o nome da promoção.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Número de código | Exibe o número de código.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Data de registro | Exibe a data em que o código foi registrado.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Data de início   | Exibe a data de início da promoção.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Data final       | Exibe a data de expiração da promoção.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Estado           | <ul style="list-style-type: none"><li>Registered: o código promocional foi adicionado e agora está disponível.</li><li>Waiting: o código promocional aguarda ativação.</li><li>Activated: agora, o código promocional está ativo.</li><li>Used: o código promocional expirou.</li></ul> |

## Registrar código de resgate

1. Insira o código de resgate e clique em "Registrar".
2. Leia o aviso e escolha "Registrar" ou "Aplicar" na caixa de diálogo pop-up.
  - **Registrar:** Registre o código de resgate. Você pode ativar e usar o código de resgate posteriormente após o registro.
  - **Aplicar:** Registre e ative o código de resgate. O desconto da promoção é aplicado imediatamente.

### Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.  
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.  
Periodic payments are stopped automatically.

CloseRegisterApply

## Ativar código de resgate

Você pode registrar vários códigos de resgate, mas precisa ativar aquele que deseja usar.

1. Clique no botão "Ativar" ao lado do código que deseja usar.
  - Caso não haja código com estado "Activated", aquele que você escolher será aplicado imediatamente.
  - Se já existir um código ativado, o código recém-selecionado muda para o estado "Waiting". Quando o código de resgate ativado no momento expirar, o novo código de resgate no estado "Waiting" será ativado automaticamente.

### Observação

Apenas um código de resgate pode estar ativado e apenas um pode ficar no estado "Waiting".


## Detalhes de pagamento

Você pode visualizar sua assinatura e seu histórico de pagamento na guia Detalhes de pagamento.


| Item               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data de pagamento  | Exibe a data do pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produto            | Exibe o plano ou aplicativo comprado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de pagamento  | Exibe o tipo de pagamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>Assinatura</li> <li>Pagamento único</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| Duração            | Exibe o período de assinatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Detalhes           | Exibe as informações detalhadas de pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Valor do pagamento | Exibe o valor de uma assinatura ou compra única.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Estado             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Payment Completed: o pagamento foi processado.</li> <li>Payment Failed: o pagamento não foi processado.</li> <li>Payment Incomplete: o pagamento não foi concluído. Clique "Pagar agora" para prosseguir.</li> <li>Waiting: o pagamento está pendente para uma renovação de assinatura.</li> </ul> |

[Ver detalhes da fatura](#)

Você pode visualizar suas faturas e recibos de pagamento clicando no ícone de recibo à direita.

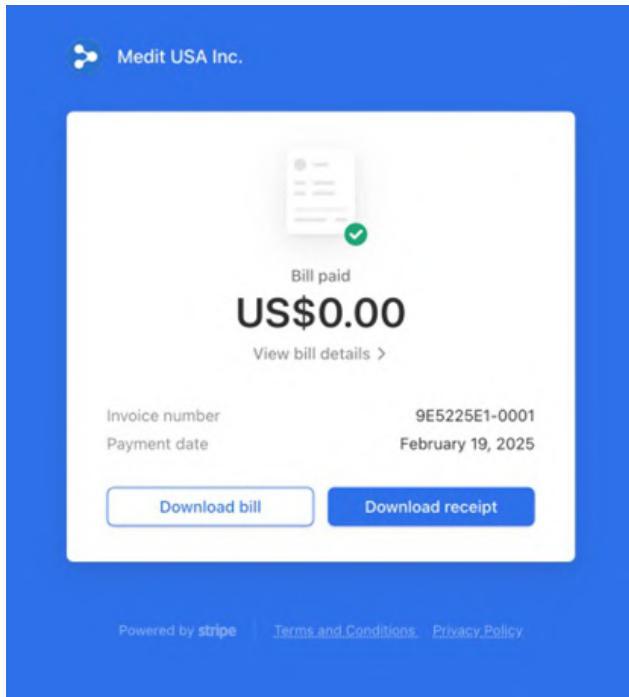

Clique em "Ver detalhes da fatura" para visualizar os detalhes de pagamento.

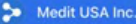



Bill paid

**US\$0.00**

[View bill details](#) 

Invoice number 9E5225E1-0001

Payment date February 19, 2025

[Download bill](#) [Download receipt](#)

Powered by [stripe](#) | [Terms and Conditions](#) | [Privacy Policy](#)

[X Close Bill Details](#)

## Paid on February 19, 2025

SUMMATION

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Target | yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com |
| source | Medit USA Inc.                    |
| bill   | #9E5225E1-0001                    |

ITEM

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025           |                 |
| Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics | US\$0.60        |
| Quantity 1 piece                          |                 |
| <b>subtotal</b>                           | <b>US\$0.60</b> |
| 1 Month Free for New Subscribers(100% 할인) | -US\$0.60       |
| <b>Payment amount</b>                     | <b>US\$0.00</b> |
| <b>Amount paid</b>                        | <b>US\$0.00</b> |
| <b>Remaining amount</b>                   | <b>US\$0.00</b> |

Do you have any questions?[Contact Medit USA Inc.](#)

## My Info

### Minha conta

Em My Info, você pode revisar e editar as informações fornecidas durante o registro e verificar seu estado de assinatura.

← → ↺ 🌐 www.meditlink.com/myinfo/account

### MEDIT Link

  
Patient

  
Case Box

  
Order Box

  
Case Talk

  
Partners

  
Membership

  
My Info

**My Account** My Clinic My Scanner

#### Account Information



Email Address  
seolah.jeon@medit.com  
[Change Email Address](#)

Password  
[Change Password](#)

Name  
seolah.jeon\_dev\_admin

Language  
English ▼

Country/Region  
Korea, Republic of ▼

**i** Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

### Minha clínica/Meu laboratório (apenas conta de Administrador)

Você pode revisar e editar as informações sobre sua clínica ou laboratório. Essa seção está disponível apenas para contas de administrador.

**MEDIT Link**

  
Dashboard

  
Patient

  
Case Box

  
Order Box

  
Case Talk

  
Partners

  
Membership

  
My Info

My Account

**My Clinic**


My Scanner

Clinic Name \*

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

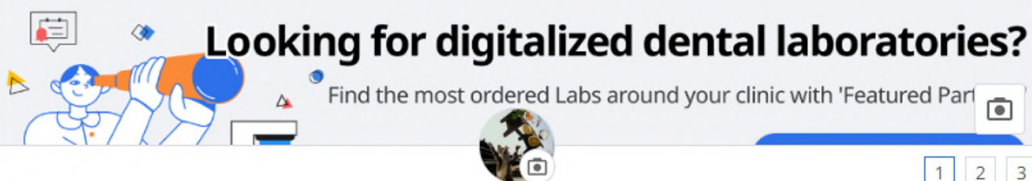

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.  
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

## Meu scanner

Você pode verificar as informações do dispositivo conectado para a conta.

MEDIT Link

Dashboard

Patients

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Home

About

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © 2024

TRUBLESHOOTING

Add more information about your business.

seolahjeon\_

English

My Account

My Clinic

My Scanner

| No. | Type | Serial Number | Usage Time ⓘ | Last Connected   | Last Calibrated  | Warranty Start Date | Warranty Expiry Date | Days L... ⓘ | Status ⓘ     |       |
|-----|------|---------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-------|
| 1   | i700 | AZ2105102619  | 0d 18h 44m   | 2024-04-12 15:19 | 2024-03-28 09:10 | 2024-02-27          | 2025-02-26           | Expired     | Unregistered | Buy ⓘ |
| 2   | i700 | AZ2105102622  | 0d 18h 39m   | 2023-04-26 20:30 | 2023-04-25 14:47 | 2021-07-09          | 2022-07-08           | Expired     | Unregistered | Buy ⓘ |
| 3   | i700 | AZ2305100410  | 0d 6h 38m    | 2025-03-06 09:52 | 2024-09-05 14:23 | -                   | -                    | -           | Registered   | Buy ⓘ |
| 4   | i600 | BG2202100001  | 0d 0h 58m    | 2023-08-28 18:10 | 2023-07-13 15:00 | 2022-10-30          | 2023-10-29           | Expired     | Unregistered | Buy ⓘ |
| 5   | i600 | BG2202100026  | 0d 8h 32m    | 2022-10-28 17:03 | 2022-09-25 09:00 | -                   | -                    | -           | Unregistered | Buy ⓘ |
| 6   | i600 | BG2202100029  | 0d 2h 38m    | -                | 2022-06-16 11:58 | -                   | -                    | -           | Unregistered | Buy ⓘ |
| 7   | i900 | CA2405100106  | 0d 11h 46m   | 2025-02-26 08:37 | 2024-11-07 10:11 | -                   | -                    | -           | Unregistered | Buy ⓘ |

ⓘ The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

| Item                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Exibe o nome do modelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Número de série                | Exibe o número de série do dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tempo de uso                   | Indica há quanto tempo o dispositivo está em uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Estado                         | <p>Exibe o estado de registro do dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Registrado" indica que o scanner foi conectado e registrado com sucesso.</li> <li>"Não registrado" indica que o scanner não está mais registrado. Se o scanner for registrado em outro grupo, ele perderá seu registro no grupo atual.</li> </ul> |
| Última conexão                 | Exibe a data da última conexão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Última calibração              | Exibe a data da última calibração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Data de início da garantia     | Exibe a data de ativação da garantia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data de vencimento da garantia | Exibe a data de expiração da garantia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dias restantes                 | Exibe o número de dias restantes antes da expiração da garantia.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Comprar                        | Permite que o usuário compre e estenda a garantia.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ícone de excluir               | Permite ao usuário remover o scanner da lista.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Menu Outros

### Aviso e atualização

Você pode verificar os avisos importantes da Medit e as atualizações de programa para o software Medit.

## Notice & Update

**Notice**  
NFT Service Termina...  
2023-04-19

**Notice**  
End of Support Notic...  
2023-04-14

**Update**  
Release Note for Me...  
2023-03-29

**Notice**  
[Medit] We've updat...  
2023-03-29

**Update**  
Release Note for Me...  
2023-03-17

**Update**  
Medit Occlusion Ana...  
2023-03-08

**Notice**  
**NFT Service Termination Notice**  
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
  - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
  - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

### Sites relacionados

Você pode obter várias informações sobre como usar o Medit Link. Acesse os recursos educacionais e informativos da Medit, como Medit Academy, Medit Academy YouTube e Centro de Ajuda Medit.

62

Need more help?



**Medit Academy** >



**YouTube** >



**Help Center** >

## Download do aplicativo Medit Link

Você pode baixar a versão mais recente do instalador do programa a partir da internet. Esse menu é útil quando você perde o instalador fornecido no pacote do produto ou possui um instalador desatualizado.

### Observação

O Medit Link se atualiza automaticamente quando você tem uma conexão com a Internet.



**Windows**

**macOS**

# Visão geral

| Patient Name    | Patient ID                | Gender | Birth Date | Number of Cases | Registration Date | Recent Visit Date ↓ |
|-----------------|---------------------------|--------|------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1. Aria         | 1234567890123456789012... |        |            | 1               | 2023-10-19        | 2023-10-26          |
| 1. Fanta 2      |                           |        |            | 1               | 2023-10-24        | 2023-10-24          |
| 1. First.A      | 210123                    | F      | 2021-01-23 | 0               | 2023-10-19        |                     |
| 1. Alexa        |                           |        |            | 0               | 2023-10-19        |                     |
| 1. Cola         |                           | F      | 1974-05-25 | 0               | 2023-10-24        |                     |
| 1. Cyder        |                           | M      | 1966-12-31 | 0               | 2023-10-24        |                     |
| 1. Orange       |                           |        |            | 0               | 2023-10-24        |                     |
| 1. Melon        |                           |        |            | 0               | 2023-10-24        |                     |
| 231020D444      |                           |        |            | 1               | 2023-10-20        | 2023-10-20          |
| 231020A111_edit | 231020A111                | F      | 1985-02-13 | 1               | 2023-10-20        | 2023-10-20          |
| 2.Second.B      | 941011                    | F      | 1994-10-11 | 0               | 2023-10-19        |                     |

|   |                       |                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Barra de título       | Consulte <a href="#">Aplicativo Medit Link &gt; Barra de título</a> para obter informações detalhadas.                                                                              |
| 2 | Menu                  | Consulte <a href="#">Aplicativo Medit Link &gt; Menu</a> para obter informações detalhadas.                                                                                         |
| 3 | Ferramentas e funções | Consulte <a href="#">Aplicativo Medit Link &gt; Visualizador de arquivos</a> e <a href="#">Aplicativo Medit Link &gt; Opções de visualização</a> para obter informações detalhadas. |
| 4 | Lista de casos        | Consulte <a href="#">Aplicativo Medit Link &gt; Filtragem e pesquisa</a> para obter informações detalhadas.                                                                         |

A tabela abaixo resume quais menus estão disponíveis em cada tipo de conta de clínica e de laboratório.

| Tipo da conta         |               | Patient | Case Box | Order Box | In Box | Work Box | Case Talk | Trash Box                                   | App Box |
|-----------------------|---------------|---------|----------|-----------|--------|----------|-----------|---------------------------------------------|---------|
| Contas de clínica     | Administrador | O       | O        | O         | X      | X        | O         | O                                           | O       |
|                       | Membro        | O       | O        | O         | X      | X        | O         | O<br>* Apenas funcionalidade de restauração | O       |
| Contas de laboratório | Administrador | X       | X        | X         | O      | O        | O         | O                                           | O       |
|                       | Membro        | X       | X        | X         | O      | O        | O         | O<br>* Apenas funcionalidade de restauração | O       |

## Barra de título

A barra de título fornece acesso rápido a funcionalidades como informações sobre a conta, notificações, notícias e atualizações, configurações e estado da rede.



## Minhas informações

Minhas informações contém informações básicas de usuário, como imagem de perfil, nome da clínica ou do laboratório, endereço de e-mail e nome de usuário.

### My Information



Clinic Name

Medit\_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

## Notificações

Você pode ver notificações relacionadas a parcerias, pedidos e processos de trabalho.

**Notification**

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

**Delivery**

Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

**Order**

Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

**Order**

Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

**Order**

Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

**Order**

Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

**Order**

Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

**Work**

Wonhoonchoi\_Clinice\_Dev\_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

**Work**

Wonhoonchoi\_Clinice\_Dev\_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close


- |   |                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Marque a caixa para mostrar apenas as mensagens não lidas.                                            |
| 2 | Clique em qualquer notificação a fim de ir instantaneamente para o caso ou página da web relacionado. |

## Notícias e Atualização

Você pode verificar os avisos importantes da Medit e as atualizações de programa para o software Medit.

## Configurações

A caixa de diálogo Configurações permite aos usuários configurar o programa.

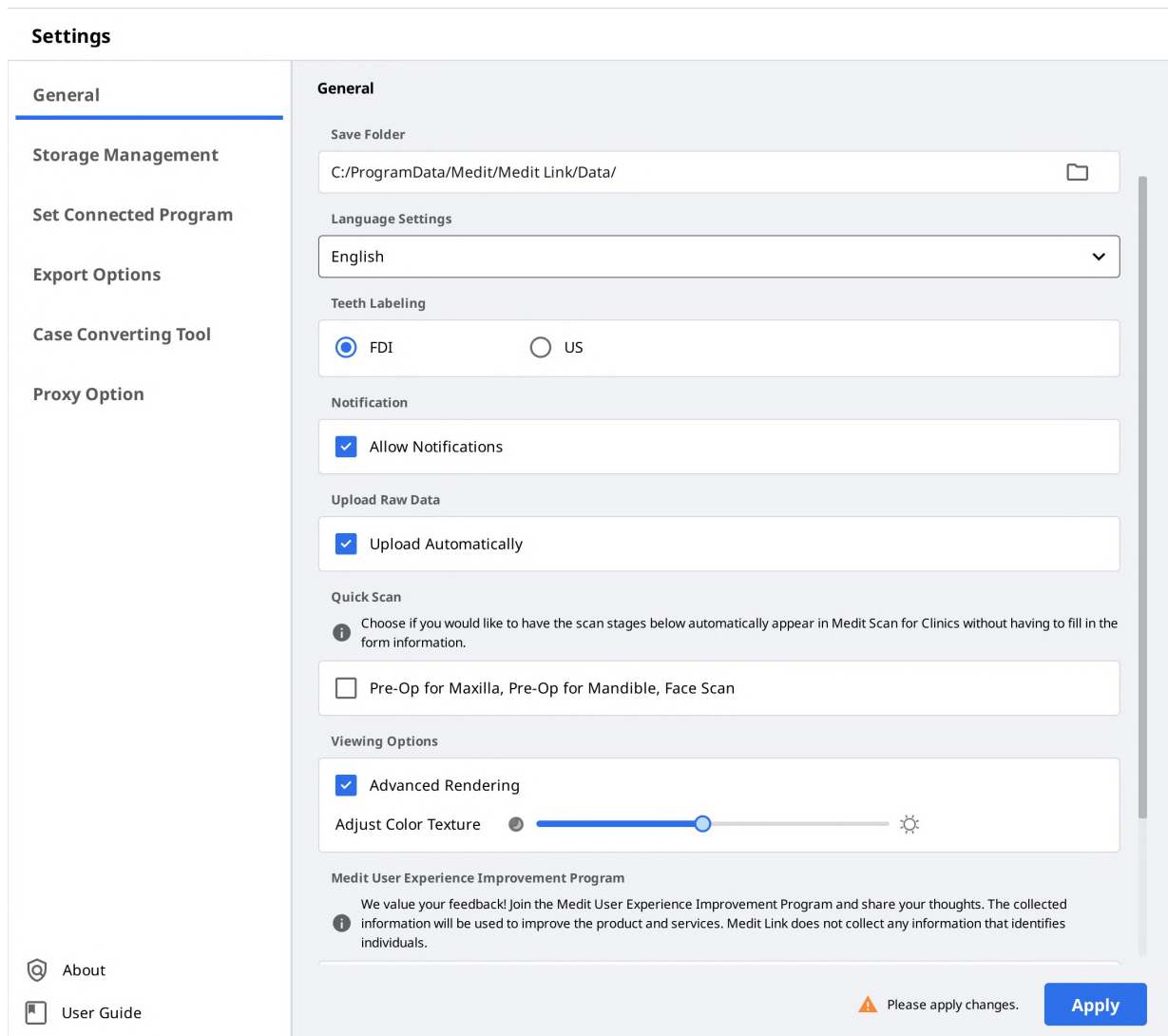

## Estado da rede

Para ajudá-lo a verificar o estado da sua conexão de rede em tempo real, o ícone de estado de rede é exibido na barra de título.

## Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Se a conexão de rede não estiver boa, poderão ocorrer as seguintes restrições:

- Algumas funções estarão restritas, como fazer o pedido de um caso, criar um caso, compartilhar via Case Talk e sincronização em nuvem.
- O desempenho geral do serviço pode ser reduzido devido ao impacto do ambiente de rede.

Nesse caso, você pode entrar no modo offline para realizar tarefas básicas e, depois, usar as funcionalidades que precisam de Internet quando estiver conectado novamente.

### Observação

O símbolo de rede indica a velocidade de resposta entre a área atual e o AWS (Amazon Web Service). Isso não significa a velocidade da sua rede, por isso, às vezes, poderá mostrar o estado como razoável ou ruim, mesmo que a velocidade da sua rede seja rápida o suficiente.

Se o outro processo usar a mesma rede, a velocidade poderá ser razoável ou ruim e o desempenho geral do Medit Link poderá ser ruim. Nesse caso, não compartilhe a rede com outros processos.

Por exemplo, a funcionalidade "Fazer upload de dados brutos" ocupa grande parte do processo de rede. Se o símbolo mostrar um estado razoável ou ruim, acesse Configurações > Fazer upload de dados brutos e desative "Upload automático".

# Configurações

## Geral

Fornece opções para a configuração geral do sistema.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasta de salvamento                                     | Especifica uma pasta para armazenar os resultados de dados gerados pelo Medit Link e programas conectados.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
| Pasta de instalação de aplicativos                      | Especifique um caminho de instalação para aplicativos da Medit Apps e de parceiros disponíveis na App Box.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
| Configurações de idioma                                 | Seleciona o idioma para o programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| Rotulagem dentária                                      | Seleciona um sistema de rotulagem dentária entre FDI e US.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
| Notificações                                            | Quando marcada, você receberá notificações de atualizações do programa.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
| Fazer upload de dados brutos                            | Quando marcada, os dados brutos são carregados automaticamente para a nuvem. Isso ajuda a fazer backup dos dados originais e executar o escaneamento contínuo ao usar o Medit Link com a mesma conta em outro PC.<br>O backup na nuvem de dados originais se aplica apenas aos dados adquiridos no Medit Scan for Clinics.                    |                                                                                                                                                           |
| Escaneamento rápido                                     | Escolha se você gostaria que os estágios de escaneamento aparecessem automaticamente na parte de baixo no Medit Scan for Clinics, sem ter que preencher as informações do formulário. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pré-operatório para maxila</li> <li>• Pré-operatório para mandíbula</li> <li>• Escaneamento da face</li> </ul> |                                                                                                                                                           |
| Opções de visualização                                  | Renderização avançada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quando marcada, o modelo 3D é exibido em uma renderização mais vívida e realista.                                                                         |
|                                                         | Ajustar textura de cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ajusta o brilho do modelo 3D.<br><br>* As cores resultantes podem diferir ligeiramente do Medit Link quando você abre os mesmos dados com outro software. |
| Programa de melhoria de experiência do usuário da Medit | Participe do Programa de melhoria de experiência do usuário da Medit. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usamos as informações coletadas para melhorar nossos produtos e serviços.</li> <li>• Não coletamos nenhuma informação que identifique indivíduos.</li> </ul>                                                                   |                                                                                                                                                           |
| Página padrão após iniciar a sessão                     | Selecione o menu padrão a ser exibido ao iniciar o programa. <ul style="list-style-type: none"> <li>• As contas de clínicas podem escolher entre Patient e Case Box</li> <li>• As contas de laboratórios podem escolher entre In Box e Work Box</li> </ul>                                                                                    |                                                                                                                                                           |

## Gerenciamento do armazenamento

Verifique e gerencie o espaço de armazenamento local e na nuvem.

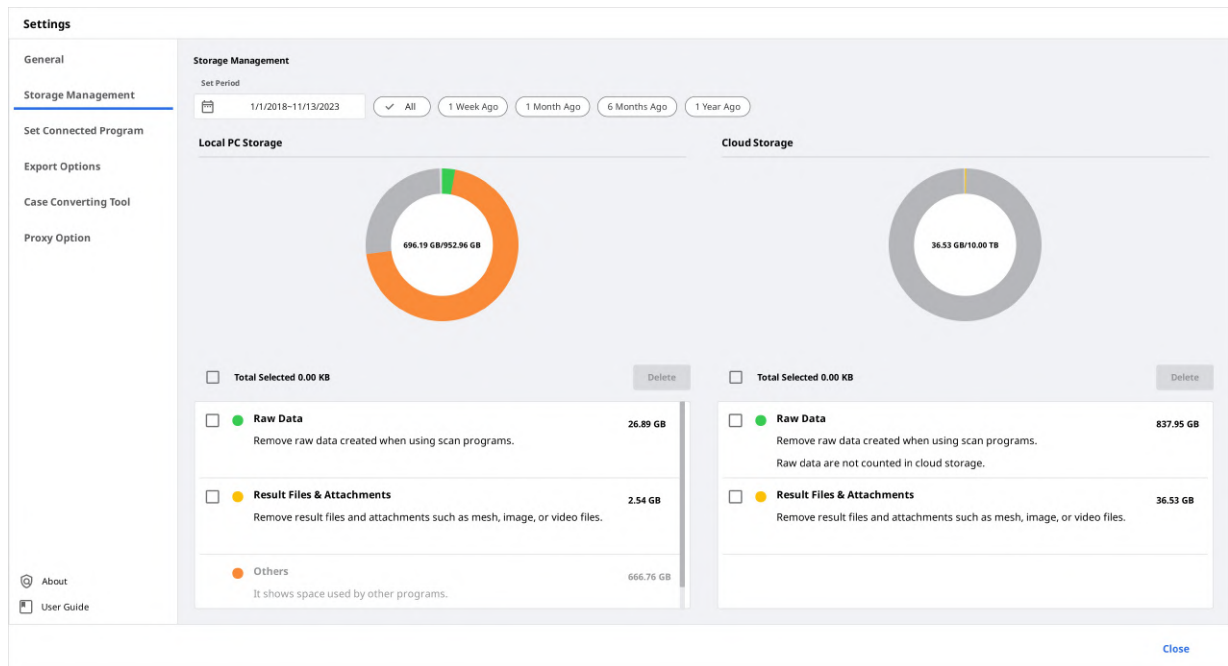

## Definir período

Define o período específico para excluir os dados criados no intervalo de tempo abaixo.

- Todos: Veja todos os arquivos.
- Uma semana atrás: Veja os arquivos para os quais se passou uma semana desde a sua criação.
- Um mês atrás: Veja os arquivos para os quais se passou um mês desde a sua criação.
- Seis meses atrás: Veja os arquivos para os quais se passaram seis meses desde a sua criação.
- Um ano atrás: Veja os arquivos para os quais se passou um ano desde a sua criação.

## Armazenamento local

Gerencie o espaço de armazenamento do PC.

|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados brutos        | Remova os dados brutos selecionados do PC.<br>Se os dados brutos já foram enviados para a nuvem, você poderá baixá-los e usá-los quando quiser.                                   |
| Resultados e anexos | Remova os arquivos de resultado e anexos do PC, como malha, imagens e vídeos.<br>Se esses arquivos já foram enviados para a nuvem, você poderá baixá-los e usá-los quando quiser. |
| Outros              | Veja os arquivos usados para operar o sistema e outros programas. Isso mostra o armazenamento do seu PC. Você não pode remover esses arquivos do Medit Link.                      |
| Excluir             | Remova os arquivos selecionados do PC.                                                                                                                                            |


## Armazenamento na nuvem

Gerencie o espaço de armazenamento na nuvem.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados brutos          | Os dados brutos não ocupam espaço no armazenamento em nuvem, portanto, não estarão no gráfico de pizza. Mas você pode gerenciar os dados brutos aqui, se necessário, por exemplo, excluí-los para proteger as informações privadas do paciente, etc. |
| Resultados e anexos   | Os arquivos de anexos e de resultado ocupam o espaço no armazenamento na nuvem. Se o armazenamento em nuvem estiver cheio, você poderá obter mais espaço de armazenamento removendo arquivos desnecessários.                                         |
| Comprar armazenamento | Se você estiver no 2 GB Plan, assine o 10 TB Plan para expandir seu armazenamento em nuvem.                                                                                                                                                          |
| Excluir               | Remova os arquivos selecionados do armazenamento em nuvem para liberar espaço de armazenamento.                                                                                                                                                      |

## Definir o programa conectado

Gerencie os programas que suportam a integração ao Medit Link.

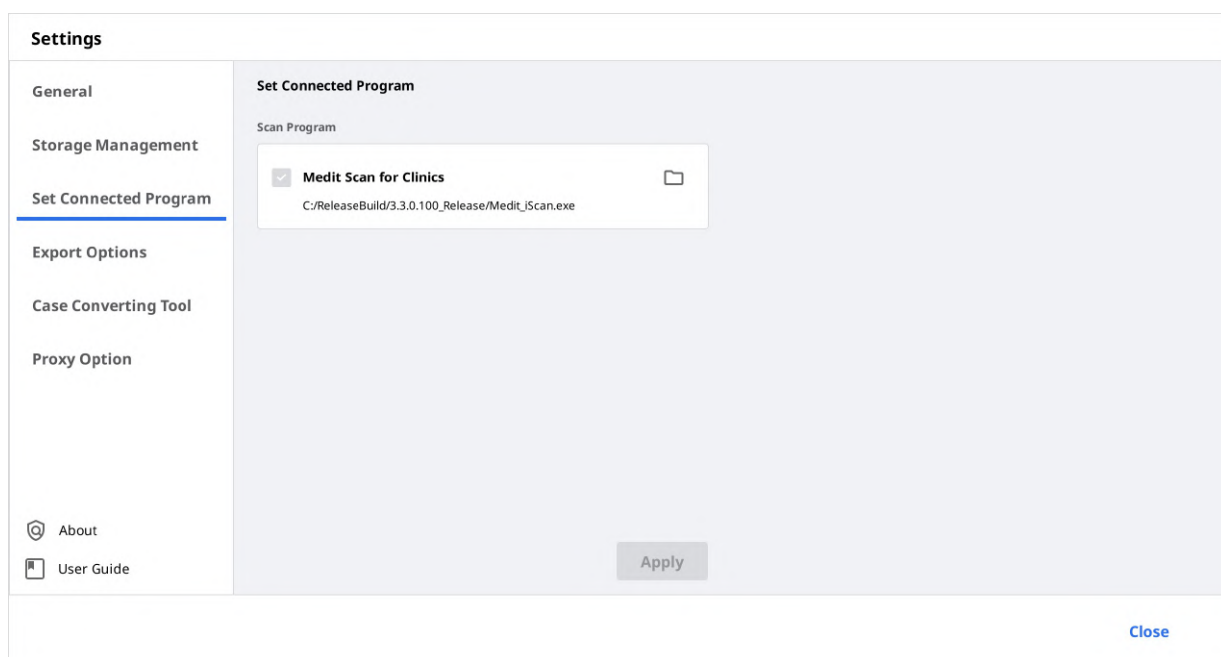

Não é possível conectar os seguintes programas:

|                          | Conta de clínica       | Conta de laboratório                          |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Programa de escaneamento | Medit Scan for Clinics | Medit Scan for Clinics<br>Medit Scan for Labs |

### Observação

A integração dos seguintes serviços não está disponível no Medit Link para Mac.

- Medit Scan for Labs

## Opções de exportação

Defina como exportar arquivos do Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn\_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply


Close

73

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                               | <p>Selecione o programa CAD que deseja usar para projetar.</p> <p>O programa ajustará os resultados com base na sua seleção, permitindo que você prossiga com o projeto sem nenhum alinhamento de eixo adicional.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Exportar arquivos para                             | Especifique o caminho onde deseja armazenar os resultados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Formato de malha                                   | Especifique o formato do arquivo de malha final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Formato da imagem                                  | Especifique o formato dos arquivos de imagem exportados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Comprimir e combinar                               | <p>Comprime todos os resultados em um único arquivo.</p> <p>Combinar malha individual: Combine todos os resultados para maxila ou mandíbula em um arquivo. Ao usar alguns programas que não podem importar e trabalhar com vários arquivos, você pode mesclá-los em um para trabalhar neles.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opções quando a mesma pasta ou arquivo já existem. | <p>Escolha a ação padrão para casos em que a mesma pasta ou nome de arquivo existe no caminho alvo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perguntar sempre ao exportar.</li> <li>• Exportar um novo arquivo e substituir os arquivos existentes. O arquivo atualmente armazenado será perdido.</li> <li>• Criar uma pasta e exportar os arquivos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Regra para nome das pastas                         | <p>Defina regras para criar um nome de pasta ao exportar arquivos.</p> <p>As regras definidas serão aplicadas à nomenclatura das pastas, e o arquivo exportado será salvo na pasta criada.</p> <p>As informações abaixo podem ser usadas para definir a regra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conta de clínica<br/>Data da criação do caso, Data de escaneamento, Data do pedido, Nome do paciente, Nome do caso, Nome do parceiro, ID do paciente, ID do pedido</li> <li>• Conta de laboratório<br/>Data da criação do caso, Data de escaneamento, Data do pedido, Nome do paciente, Nome do caso, Nome do parceiro, ID do pedido</li> </ul> |
| Regra para nome dos arquivos                       | <p>Defina regras para o nome do arquivo exportado.</p> <p>As informações abaixo podem ser usadas para definir a regra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conta de clínica<br/>Data da criação do caso, Data de escaneamento, Data do pedido, Nome do paciente, Nome do caso, Nome do parceiro, ID do paciente, ID do pedido</li> <li>• Conta de laboratório<br/>Data da criação do caso, Data de escaneamento, Data do pedido, Nome do paciente, Nome do caso, Nome do parceiro, ID do pedido</li> </ul>                                                                                                                                         |

## Ferramenta de conversão de casos


Você pode mover casos entre contas diferentes exportando casos existentes da conta ou importando casos exportados de outras contas.

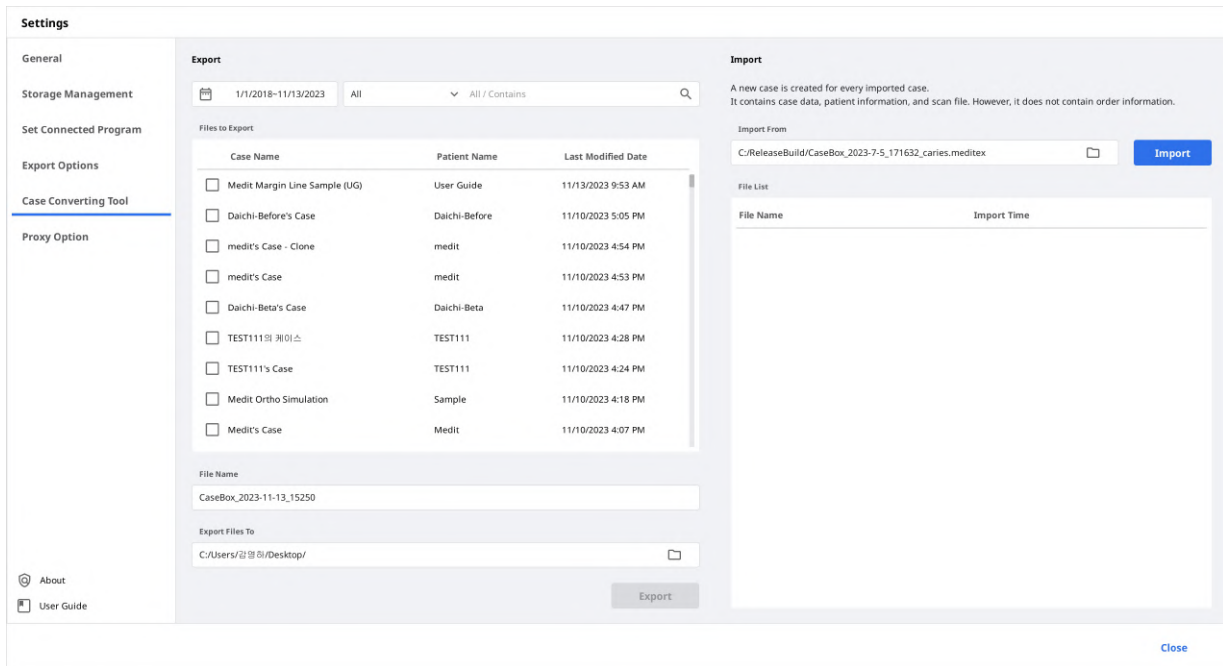


## Exportar caso

Exporte casos da conta conectada atualmente para o PC local.


1. Abra o Medit Link e clique no ícone Configurações.

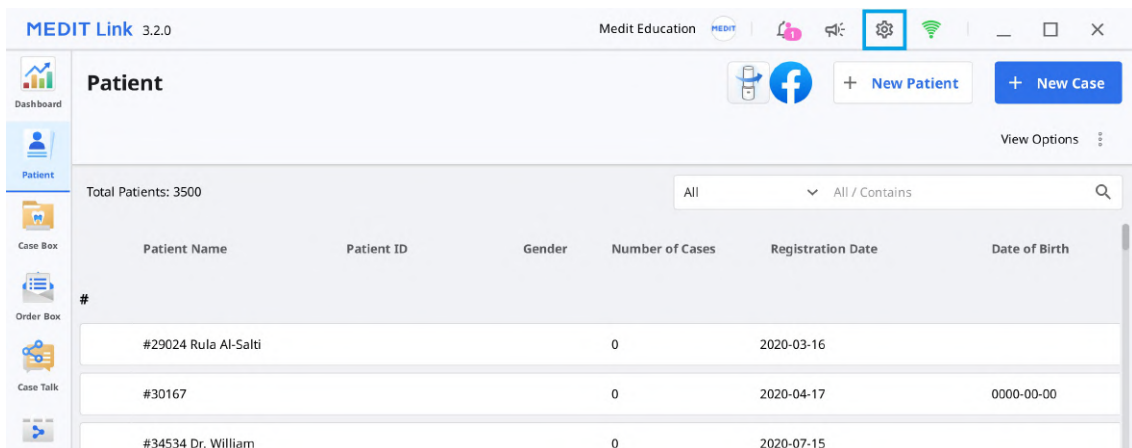


2. Escolha a seção "Ferramenta de conversão de casos" no menu esquerdo.

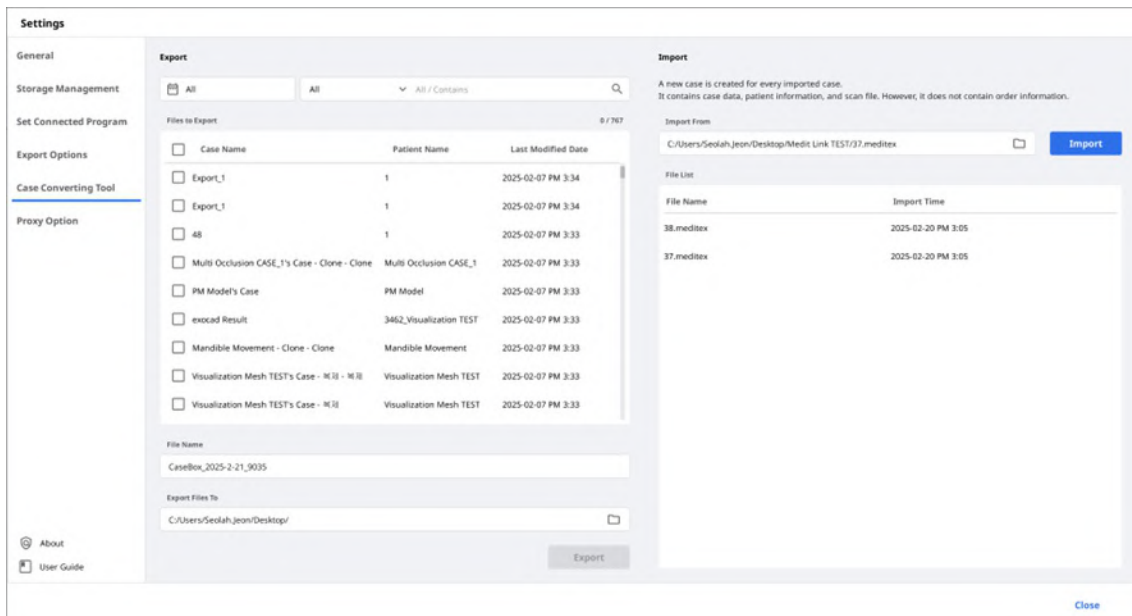

3. Na seção Exportar, defina um período ou pesquise casos para exportar, se necessário.

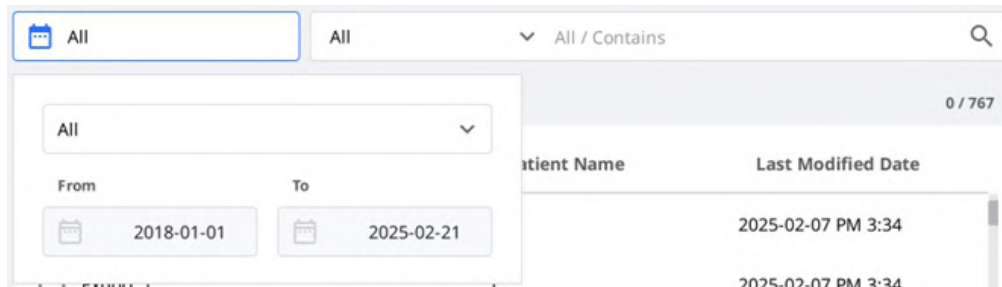

4. Escolha os casos que deseja exportar na lista da seção "Arquivos para exportar".

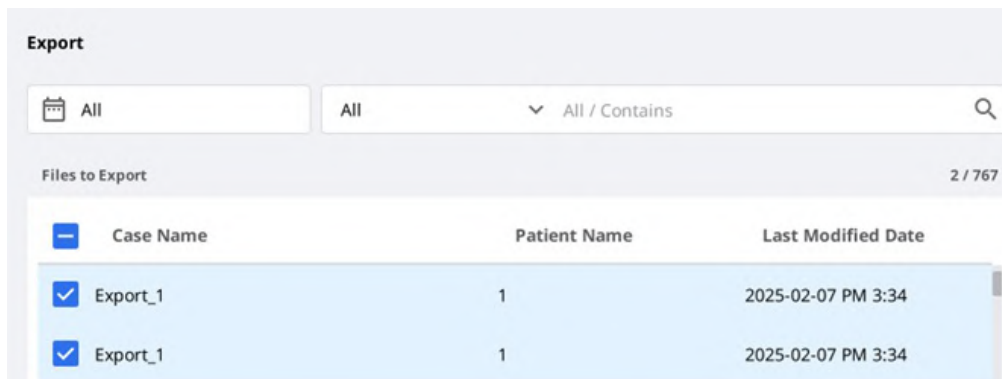

5. Defina o nome do arquivo editando o nome do caso no campo Nome do arquivo.  
6. Defina a pasta de destino para a qual exportar os casos selecionados.  
7. Clique em "Exportar".  
8. Clique em "Sim" a fim de abrir a pasta para a qual o arquivo foi exportado.

## Question



Exporting successfully completed.  
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. Os casos exportados são salvos no formato de arquivo .meditex.

## Importar caso

1. Abra o Medit Link e clique no ícone Configurações.

MEDIT Link 3.2.0 Medit Education

**Patient**

Total Patients: 3500

All / Contains

| # | Patient Name         | Patient ID | Gender | Number of Cases | Registration Date | Date of Birth |
|---|----------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|---------------|
|   | #29024 Rula Al-Salti |            |        | 0               | 2020-03-16        |               |
|   | #30167               |            |        | 0               | 2020-04-17        | 0000-00-00    |
|   | #34534 Dr. William   |            |        | 0               | 2020-07-15        |               |

- Escolha a seção "Ferramenta de conversão de casos" no menu esquerdo.

**Settings**

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

**Case Converting Tool**

Proxy Option

About

User Guide

**Export**

All / Contains

Files to Export 0 / 767

| Case Name                                                              | Patient Name            | Last Modified Date |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Export_L1                                     | 1                       | 2025-02-07 PM 3:34 |
| <input type="checkbox"/> Export_L1                                     | 1                       | 2025-02-07 PM 3:34 |
| <input type="checkbox"/> 48                                            | 1                       | 2025-02-07 PM 3:33 |
| <input type="checkbox"/> Multi Occlusion CASE_1's Case - Clone - Clone | Multi Occlusion CASE_1  | 2025-02-07 PM 3:33 |
| <input type="checkbox"/> PM Model's Case                               | PM Model                | 2025-02-07 PM 3:33 |
| <input type="checkbox"/> exocad Result                                 | 3462_Visualization TEST | 2025-02-07 PM 3:33 |
| <input type="checkbox"/> Mandible Movement - Clone - Clone             | Mandible Movement       | 2025-02-07 PM 3:33 |
| <input type="checkbox"/> Visualization Mesh TEST's Case - WII - WII    | Visualization Mesh TEST | 2025-02-07 PM 3:33 |
| <input type="checkbox"/> Visualization Mesh TEST's Case - WII          | Visualization Mesh TEST | 2025-02-07 PM 3:33 |

File Name

CaseBox\_2025-2-21\_9035

Export Files To

C:/Users/Seolah.Jeon/Desktop/

Export

**Import**

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/Users/Seolah.Jeon/Desktop/Medit Link TEST/37.meditex

Import

File List

| File Name  | Import Time        |
|------------|--------------------|
| 38.meditex | 2025-02-20 PM 3:05 |
| 37.meditex | 2025-02-20 PM 3:05 |

Close

- Na seção Importar, clique no ícone da pasta para procurar no seu PC o arquivo .meditex que deseja importar.

**Import**

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox\_2023-11-13\_152111.meditex

Import

- Clique no botão "Importar" e verifique os arquivos a importar na lista abaixo.

**Import**

A new case is created for every imported case.  
It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox\_2023-11-13\_152111.meditex 

**Import**

File List

| File Name                         | Import Time        |
|-----------------------------------|--------------------|
| CaseBox_2023-10-23_161849.meditex | 11/13/2023 4:08 PM |
| CaseBox_2023-11-13_152111.meditex | 11/13/2023 4:08 PM |

5. O caso importado aparecerá também na sua Case Box (conta de clínica) ou Work Box (conta de laboratório).

## Opções de proxy

Em alguns ambientes de rede limitados, você pode alterar as configurações de rede.

**Settings**

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

**Proxy Option**

**Proxy Server** ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

**Close**

## Sobre

Exibe informações detalhadas sobre o Medit Link.

## About

# MEDIT Link

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Product Name | Medit Link        |
| Version      | 3.3.0             |
| Build Number | 123               |
| Server       | Operation Korea   |
| UDI DI       | (01)8800026700449 |
| UDI PI       | (10)3.3.0         |

### Medit Corp.

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 품목명              | 1등급 치과 영상 전송장치소프트웨어          |
| 모델명              | ML-STD001                    |
| 품목별제조신고번호        | 제신 25-112호                   |
| 사용방법 및 사용시 주의 사항 | 사용설명서 참조                     |
| 부작용 보고 관련 문의처    | 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183    |
| 제조자의 상호:         | (주)메디트                       |
| 제조자의 주소:         | 서울특별시 영등포구 양평로 25길 8 9층, 10층 |
| 제조자의 연락처:        | +82-2-2193-9600              |

본 제품은 「디지털의료기기소프트웨어」임

 2025.03

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☐ Send Anonymous Usage Statistics

Close

## Guia do usuário


Mostra o Guia do usuário do Medit Link.

Para abrir o guia do usuário, é preciso uma conexão com a Internet.

# Menu

## Dashboard

É possível visualizar as estatísticas de todo o trabalho realizado no Medit Link em gráficos e tabelas visualizados, tanto no aplicativo Medit Link quanto na sua versão para Web.

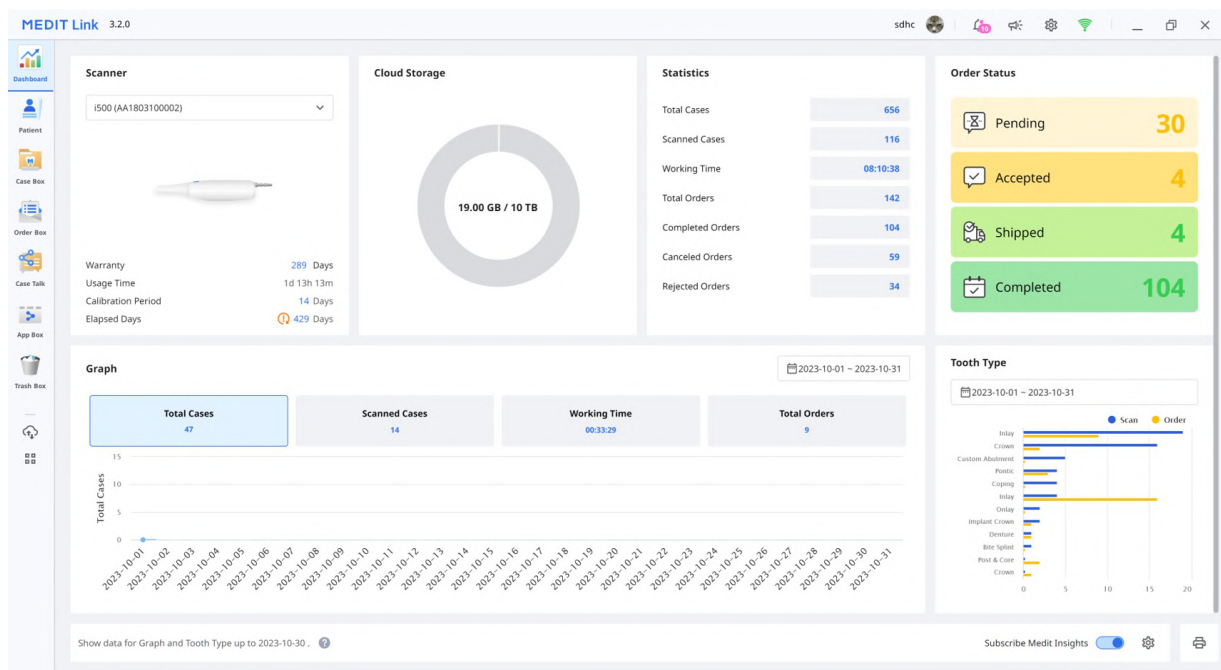


### Observação

Consulte [Medit Link Web > Dashboard](#) para obter mais informações sobre o dashboard e o Medit Insights.

## Patient


É possível adicionar, editar, excluir ou mesclar pacientes no menu Patient.

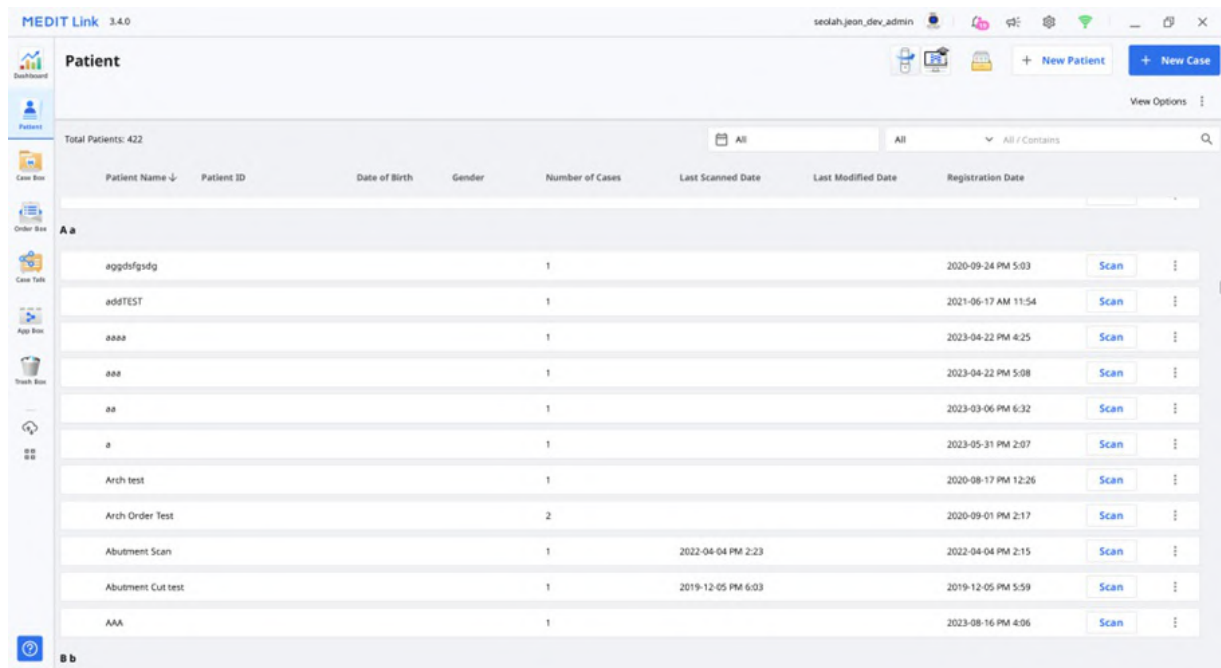

| Patient Name      | Patient ID | Date of Birth | Gender | Number of Cases | Last Scanned Date  | Last Modified Date | Registration Date   |
|-------------------|------------|---------------|--------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| agdsfgsdg         |            |               |        | 1               |                    |                    | 2020-09-24 PM 5:03  |
| addTEST           |            |               |        | 1               |                    |                    | 2021-06-17 AM 11:54 |
| aaaa              |            |               |        | 1               |                    |                    | 2023-04-22 PM 4:25  |
| aaa               |            |               |        | 1               |                    |                    | 2023-04-22 PM 5:08  |
| aa                |            |               |        | 1               |                    |                    | 2023-03-06 PM 6:32  |
| a                 |            |               |        | 1               |                    |                    | 2023-05-31 PM 2:07  |
| Arch test         |            |               |        | 1               |                    |                    | 2020-08-17 PM 12:26 |
| Arch Order Test   |            |               |        | 2               |                    |                    | 2020-09-01 PM 2:17  |
| Abutment Scan     |            |               |        | 1               | 2022-04-04 PM 2:23 |                    | 2022-04-04 PM 2:15  |
| Abutment Cut test |            |               |        | 1               | 2019-12-05 PM 6:03 |                    | 2019-12-05 PM 5:59  |
| AAA               |            |               |        | 1               |                    |                    | 2023-08-16 PM 4:06  |

## Adicionar novo paciente

1. Clique em "Novo paciente".

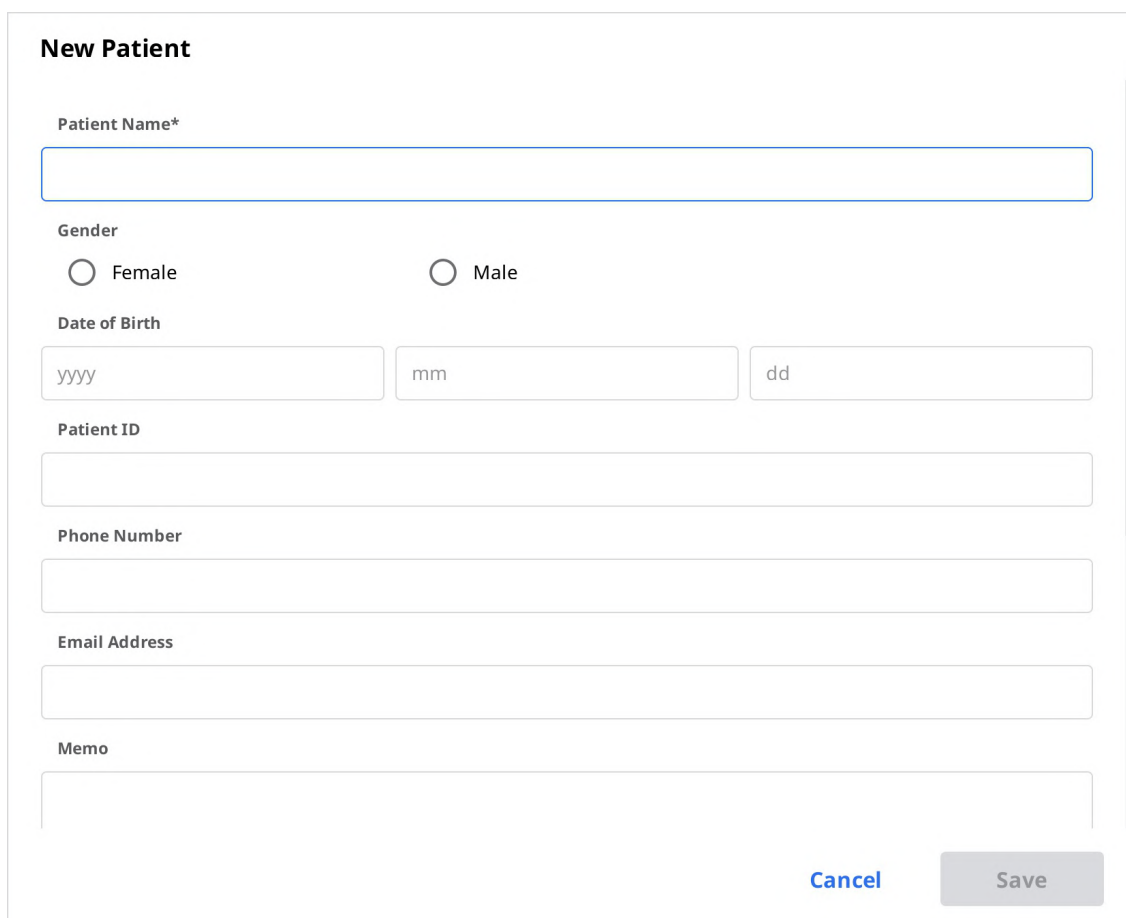

**New Patient**

Patient Name\*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save


2. Preencha as informações necessárias na caixa de diálogo Novo paciente e clique em "Salvar".

## Excluir paciente

## Observação

Você pode excluir um paciente apenas se não houver casos para ele.

1. Selecione o paciente a ser excluído da lista.

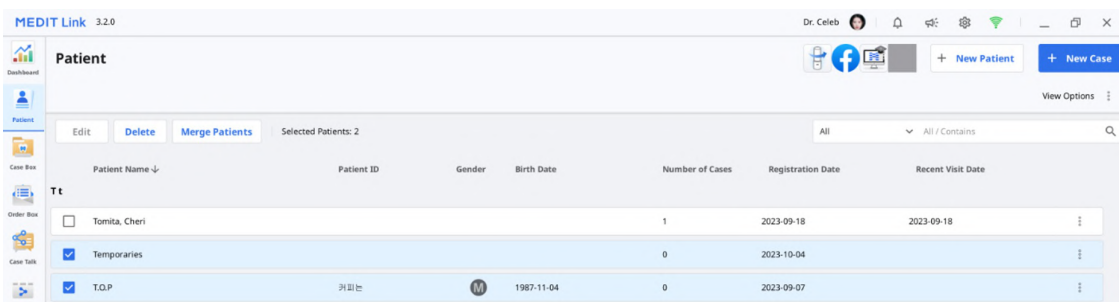


2. Clique em "Excluir".

## Mesclar pacientes

Você pode mesclar todos os casos de vários pacientes em um paciente.

1. Selecione os pacientes que você deseja mesclar da lista.

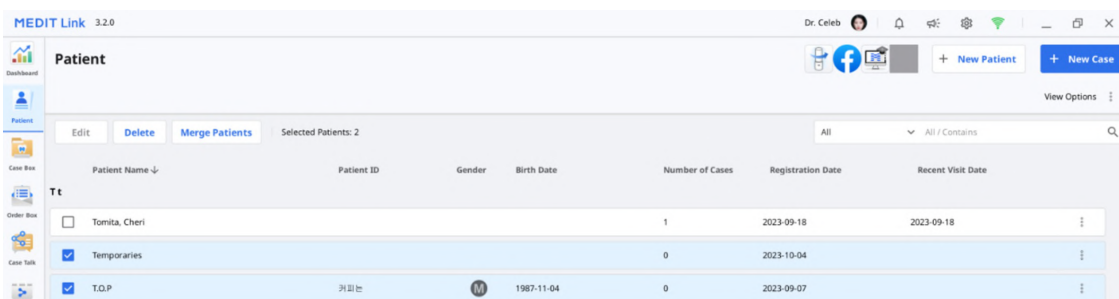

2. Clique em "Mesclar pacientes".
3. Selecione o paciente alvo no qual você gostaria de mesclar todos os casos.
4. Todos os casos são mesclados no paciente alvo e as informações do paciente alvo são mantidas.

**Merge all patient information to**


Please select the patient you'd like to merge all data to.  
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

|                                  | Patient Name        | Patient ID | Gender | Birth Date | Number of Cases | Date Registered | Recent Visit Date |
|----------------------------------|---------------------|------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 5-9_iScan_CAMOrd... |            |        |            | 1               | 2020-09-18      | 2020-09-18        |
| <input type="radio"/>            | test                |            |        |            | 2               | 2020-09-17      | 2020-09-17        |
| <input type="radio"/>            | test                |            |        |            | 22              | 2019-07-26      | 2020-09-17        |

[Cancel](#) [Apply](#)

5. Clique em "Aplicar" para continuar com a mesclagem.

## Case Box/Work Box

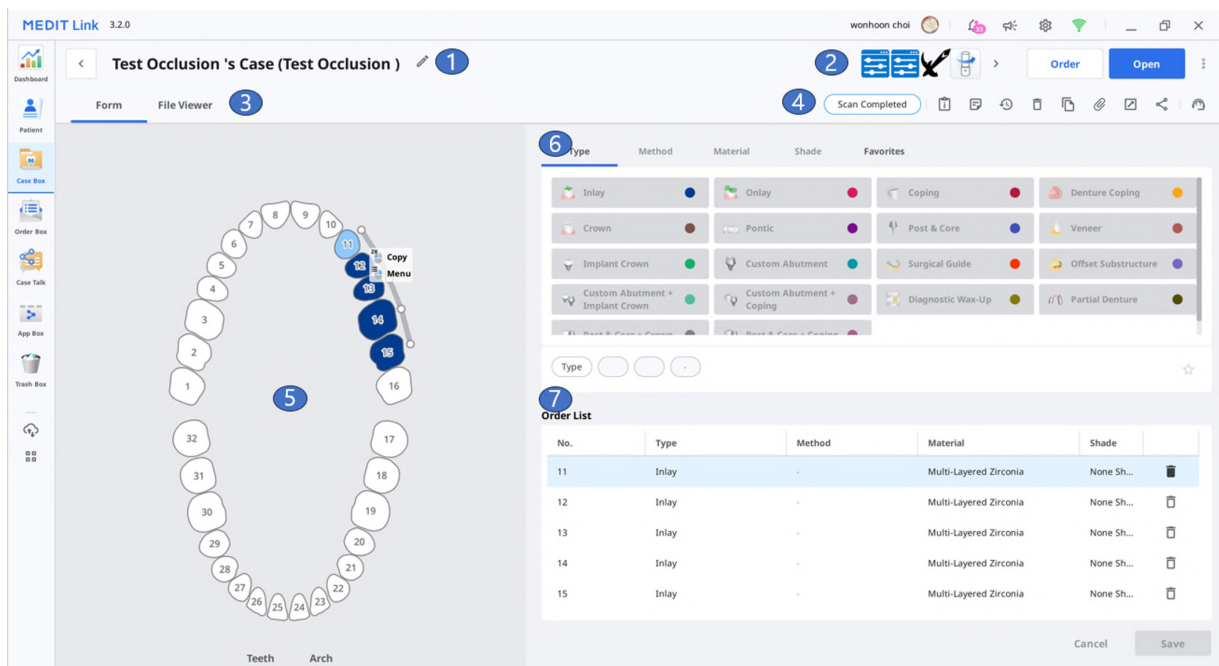

|   |                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Exibe os nomes do caso e do paciente.                                                                                             |
| 2 | Fornecer as principais funcionalidades disponíveis: botão Escanear ou Abrir, botão Pedido, ícones de aplicativos.                 |
| 3 | Exibe as guias disponíveis: Formulário, Visualizador de arquivos.                                                                 |
| 4 | Exibe funções de gerenciamento de casos e arquivos.                                                                               |
| 5 | Mostra a IU de registro de formulário para o programa de escaneamento selecionado.                                                |
| 6 | Fornecer as informações de tipo/método/material/tonalidade para os usuários escolherem em relação ao número de dente selecionado. |
| 7 | Exibe as informações de tipo/método/material/tonalidade aplicadas aos dentes selecionados.                                        |

## Guias em Case Box/Work Box

| Formulário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Visualizador de arquivos                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A guia de formulário fornece uma UI para inserir informações básicas para o trabalho de escaneamento, como tipo, método, material para números de dentes e opções de escaneamento. As informações inseridas são passadas para o programa de escaneamento conectado e usadas como informações de pedido ao fazer um pedido para o seu parceiro. | Visualize os arquivos de resultados gerados pelos programas de escaneamento e CAD. O visualizador de arquivos exibe e gerencia os modelos 3D adquiridos ou anexados e imagens 2D. |

## Funções em Case Box/Work Box

As seguintes funções são fornecidas na Case Box/Work Box.

|                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                   |                      |                   |                      |                   |                  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------|
|                                                                                     | Estado do caso            | Exibe o estado do caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                   |                      |                   |                      |                   |                  |       |
|    | Acesse a Order Box/In Box | Fornece um atalho para o mesmo caso em outra caixa (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                   |                      |                   |                      |                   |                  |       |
|    | Informações sobre o caso  | Revisa os detalhes do caso e os salva como PDF ou os imprime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                   |                      |                   |                      |                   |                  |       |
|    | Notas e etiquetas         | Adiciona uma nota ou etiquetas ao registrar ou fazer o pedido de um caso. Use-as para comunicar qualquer informação adicional ou complementar sobre o caso aos seus parceiros.                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                      |                   |                      |                   |                  |       |
|    | Histórico do caso         | <p>Fornece informações detalhadas sobre o histórico do caso.</p> <div><p><b>History</b></p><table><tr><td><b>Last Modified Date</b></td><td>3/29/2022 1:57 PM</td></tr><tr><td><b>Scanning Date</b></td><td>4/12/2021 2:06 PM</td></tr><tr><td><b>Creation Date</b></td><td>3/22/2022 1:17 PM</td></tr></table><hr/><table><tr><td><b>Case Size</b></td><td>435MB</td></tr></table><p><a href="#">Close</a></p></div> | <b>Last Modified Date</b> | 3/29/2022 1:57 PM | <b>Scanning Date</b> | 4/12/2021 2:06 PM | <b>Creation Date</b> | 3/22/2022 1:17 PM | <b>Case Size</b> | 435MB |
| <b>Last Modified Date</b>                                                           | 3/29/2022 1:57 PM         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                   |                      |                   |                      |                   |                  |       |
| <b>Scanning Date</b>                                                                | 4/12/2021 2:06 PM         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                   |                      |                   |                      |                   |                  |       |
| <b>Creation Date</b>                                                                | 3/22/2022 1:17 PM         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                   |                      |                   |                      |                   |                  |       |
| <b>Case Size</b>                                                                    | 435MB                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                   |                      |                   |                      |                   |                  |       |
|  | Excluir                   | <p>Exclui o caso.</p> <p>Não é possível excluir casos solicitados ou criados offline.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                   |                      |                   |                      |                   |                  |       |
|  | Clonar                    | <p>Cria uma duplicata do caso atual na Case Box. Todos os dados serão copiados para o caso clonado.</p> <p>Essa funcionalidade ajuda a replicar informações de tratamento para o mesmo paciente ou fazer um pedido adicional com as mesmas informações ou arquivos.</p>                                                                                                                                               |                           |                   |                      |                   |                      |                   |                  |       |
|  | Anexar                    | Anexa arquivos em vários formatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                   |                      |                   |                      |                   |                  |       |
|  | Exportar                  | <p>Exporta arquivos de resultado de escaneamento ou CAD para o PC local. Você pode escolher seu formato de arquivo preferido ao exportar arquivos.</p> <p>Os arquivos exportados podem ser usados em software CAD e CAM para trabalhos posteriores.</p>                                                                                                                                                               |                           |                   |                      |                   |                      |                   |                  |       |
|  | Compartilhar              | <p>Cria um link para compartilhamento.</p> <p>Os usuários com o link compartilhado podem acessar os dados 3D em um navegador como Chrome, Firefox ou Safari sem instalar programas adicionais.</p> <p>É possível compartilhar o link livremente com qualquer pessoa ou apenas com pessoas específicas. Um código PIN ou uma data de validade do link podem ser definidos para proteger informações particulares.</p>  |                           |                   |                      |                   |                      |                   |                  |       |
|  | Enviar pedido de suporte  | Abre uma página do Centro de ajuda Medit para permitir o envio de uma solicitação de suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                   |                      |                   |                      |                   |                  |       |

## Order Box/In Box

| Type     | Method | Material               | Shade      |
|----------|--------|------------------------|------------|
| 11 Inlay | -      | Multi-Layered Zirconia | None Shade |
| 12 Inlay | -      | Multi-Layered Zirconia | None Shade |
| 13 Inlay | -      | Multi-Layered Zirconia | None Shade |
| 14 Inlay | -      | Multi-Layered Zirconia | None Shade |

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Exibe os nomes do caso e do paciente.                                                                                                                                            |
| 2 | Fornecer funções para gestão de pedidos (aceitar/cancelar; entregar/receber).                                                                                                    |
| 3 | Exibe as guias disponíveis: Pedido, Visualizador de arquivos.                                                                                                                    |
| 4 | Exibe funções para gerenciar casos e arquivos: estado do caso, atalhos para informações detalhadas, informações do caso, notas e etiquetas, etc.                                 |
| 5 | Exibe as informações detalhadas do pedido, incluindo número do pedido, nome do paciente, nome da conta, data de escaneamento, data do pedido, data de entrega, nota e etiquetas. |
| 6 | Exibe as informações do produto pedido e o estado de entrega.                                                                                                                    |

## Guias em Order Box/In Box

| Pedido                                                                                                                                                                                       | Visualizador de arquivos                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifique as informações detalhadas relacionadas ao pedido, como número do pedido, nome do paciente, nome da conta, data de escaneamento, data do pedido, data de entrega, nota e etiquetas. | Visualize arquivos gerados por operações de escaneamento/CAD. O visualizador de arquivos exibe e gerencia os modelos 3D adquiridos ou anexados e imagens 2D. |

## Case Talk

Os casos criados no Medit Link podem ser compartilhados com pessoas específicas, com qualquer pessoa com o link compartilhado ou com membros registrados do Medit Link.

O usuário pode ver uma lista de todos os casos compartilhados no Case Talk do aplicativo Medit Link e do Medit Link Web.

### Observação

O serviço Case Talk exige conexão com a internet.

| Case Talk Name                                             | Patient Name  | Form Information           | Scanned Date | Shared Date      | Expiration Date |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 2022_04_06_MEDIT NFT                                       | hk****        | 27 36                      | -            | 2022-04-06 13:40 | unlimited       |
| seolahjeon                                                 | hk****        | 11, 12, 13, 21, 22, 23     | -            | 2022-04-01 11:48 | unlimited       |
| 2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02 | 2***** TE** 2 | 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36 | -            | 2022-03-31 18:46 | unlimited       |

Casos compartilhados podem ser visualizados por meio de um navegador da web sem instalar um programa separado, permitindo uma comunicação fácil sobre os dados 3D em vários dispositivos.

## App Box

A App Box fornece vários programas complementares que suplementam seu fluxo de trabalho de escaneamento básico e aumentam a produtividade. Você pode fazer download e instalar os aplicativos fornecidos para criar dispositivos dentários, analisar dados de escaneamento, ajudá-lo durante uma consulta ou agilizar seu processo de trabalho.

## Tudo


A guia "Tudo" mostra a lista de todos os aplicativos fornecidos, incluindo aplicativos originais desenvolvidos pela Medit (Medit Apps) e aplicativos de parceiros, que são aplicativos de integração com parceiros da Medit de diversos setores da odontologia digital, como impressão 3D, software de CAD/CAM, etc.

## Medit Apps

A guia "Medit Apps" mostra apenas a lista de aplicativos originais desenvolvidos pela Medit.

## Baixados

A guia "Baixados" mostra a lista de aplicativos atualmente instalados no seu PC e dos aplicativos que possuem histórico de download pela conta do usuário.

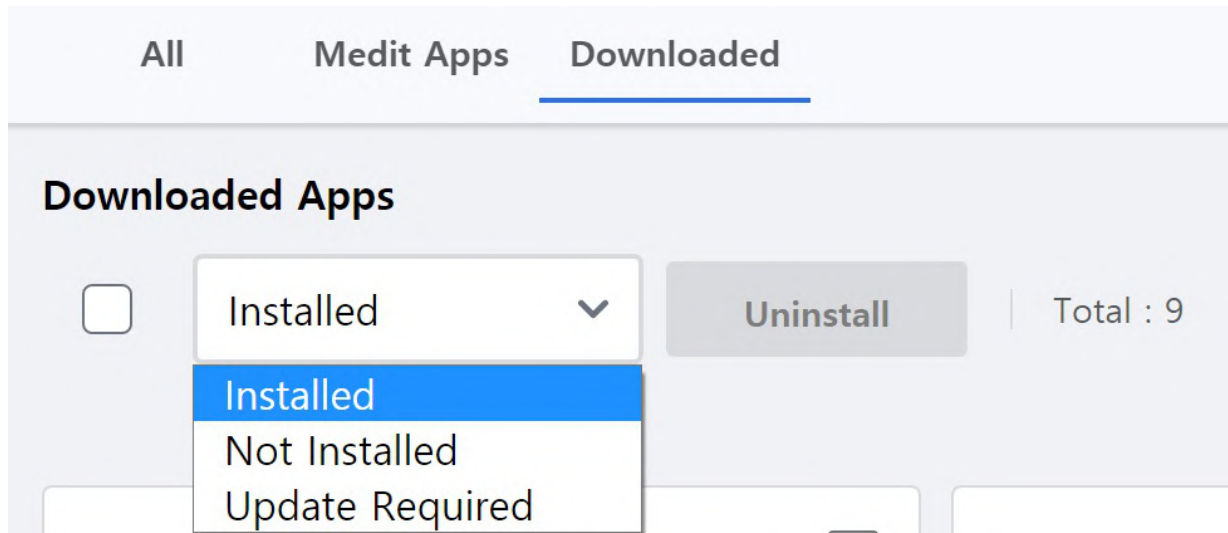

- **Instalados:** essa opção mostra apenas os aplicativos instalados no PC no qual o usuário fez login.
- **Não instalados:** essa opção permite ver os aplicativos instalados em outros PCs para que você possa instalá-los rapidamente.
- **Atualização necessária:** essa opção mostra apenas os aplicativos instalados no PC atual que precisam ser atualizados.

## Trash Box

A Trash Box armazena temporariamente os casos excluídos. Qualquer caso na Trash Box pode ser restaurado ou excluído permanentemente.

### Cuidado

Os dados excluídos da Trash Box serão excluídos permanentemente do seu PC e do servidor e não poderão ser recuperados.

| MEDIT Link 3.2.0                                                            |                                                    | wonhoon choi                                    |          |                     |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|-----------|
| Trash Box                                                                   |                                                    |                                                 |          |                     |              |           |
| <input type="checkbox"/> Restore <input type="checkbox"/> Selected Cases: 0 |                                                    | All <input type="text" value="All / Contains"/> |          |                     |              |           |
| Status                                                                      | Case Name                                          | Patient Name                                    | Lab Name | Deletion Date ↓     | Deleted By   | Size      |
| <input type="checkbox"/> Scan Completed                                     | Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone                    | 임플란트 46, 47                                     |          | 2023-04-26 오전 9:12  | wonhoon choi | 66,654 KB |
| <input type="checkbox"/> Form Only                                          | G11598492304180810429                              | test test                                       |          | 2023-04-18 오후 5:15  | wonhoon choi | 0 KB      |
| <input type="checkbox"/> Form Only                                          | G11598492304180806313                              | test test                                       |          | 2023-04-18 오후 5:15  | wonhoon choi | 0 KB      |
| <input type="checkbox"/> Form Only                                          | G11598492304180811349                              | tes test                                        |          | 2023-04-18 오후 5:15  | wonhoon choi | 0 KB      |
| <input type="checkbox"/> Form Only                                          | G11598492304180754083                              | Glidewell_fastdesign                            |          | 2023-04-18 오후 5:00  | wonhoon choi | 0 KB      |
| <input type="checkbox"/> Form Only                                          | G11598492304180733332                              | Glidewell_fastdesign                            |          | 2023-04-18 오후 5:00  | wonhoon choi | 0 KB      |
| <input type="checkbox"/> Form Only                                          | G11598492304180648146                              | test test                                       |          | 2023-04-18 오후 5:00  | wonhoon choi | 0 KB      |
| <input type="checkbox"/> Case Completed                                     | Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone         | Multi Occlusion Normal Case                     |          | 2023-04-18 오전 10:50 | wonhoon choi | 23,652 KB |
| <input type="checkbox"/> CAD                                                | Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone | Multi Occlusion Normal Case                     |          | 2023-04-18 오전 10:50 | wonhoon choi | 23,652 KB |
| <input type="checkbox"/> Form Only                                          | Occlusion Test's Case                              | Occlusion Test                                  |          | 2023-04-17 오후 6:31  | wonhoon choi | 0 KB      |
| <input type="checkbox"/> Form Only                                          | Test Occlusion 's Case                             | Test Occlusion                                  |          | 2023-04-17 오후 6:31  | wonhoon choi | 0 KB      |
| <input type="checkbox"/> Form Only                                          | Occlusion Test's Case                              | Occlusion Test                                  |          | 2023-04-17 오후 6:31  | wonhoon choi | 0 KB      |
| <input type="checkbox"/> Form Only                                          | Occlusion Test's Case                              | Occlusion Test                                  |          | 2023-04-17 오후 6:26  | wonhoon choi | 0 KB      |

## Gerenciador da sincronização de casos

O Gerenciador da sincronização de casos ajuda a fazer upload e download de casos de forma eficiente. Você pode fazer o upload de vários casos para a nuvem ou fazer o download deles para o PC local. Para identificar casos que exigem sincronização, basta pesquisá-los ou aplicar filtros de data.

### Case Synchronization Manager

| Upload                           |                                   | Download                                                                                       |                    |           |                 |   |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|---|
| <input type="text" value="All"/> |                                   | Case Name <input type="text" value="Case Name / Contains"/>                                    |                    |           |                 |   |
| Total Cases: 210                 |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> No Date         Data Type <input type="text" value="All"/> |                    |           |                 |   |
| <input type="checkbox"/>         | Case Name                         | Patient Name                                                                                   | Scanned Date ↓     | Size      | Status          |   |
| <input type="checkbox"/>         | BLATRIX Charline's Case           | BLATRIX Charline                                                                               | 2025-01-06 PM 6:28 | 729.30 MB | Upload Required | 🗑 |
| <input type="checkbox"/>         | BLATRIX Charline's Case           | BLATRIX Charline                                                                               | 2025-01-06 PM 6:28 | 729.30 MB | Upload Required | 🗑 |
| <input type="checkbox"/>         | BLATRIX Charline's Case - 복제      | BLATRIX Charline                                                                               | 2025-01-06 PM 6:28 | 733.35 MB | Upload Required | 🗑 |
| <input type="checkbox"/>         | BLATRIX Charline's Case - Clone   | BLATRIX Charline                                                                               | 2025-01-06 PM 6:28 | 734.01 MB | Upload Required | 🗑 |
| <input type="checkbox"/>         | test의 케이스                         | Patient TEST                                                                                   | 2023-04-26 PM 7:58 | 1.25 GB   | Upload Required | 🗑 |
| <input type="checkbox"/>         | i700 HD's Case                    | i700 HD                                                                                        | 2023-04-24 PM 5:23 | 911.24 MB | Upload Required | 🗑 |
| <input type="checkbox"/>         | Mandibular Movement               | MEDIT                                                                                          | 2023-04-24 PM 1:59 | 1.88 GB   | Upload Required | 🗑 |
| <input type="checkbox"/>         | Mandibular Movement Case          | MEDIT                                                                                          | 2023-04-24 PM 1:59 | 1.75 GB   | Upload Required | 🗑 |
| <input type="checkbox"/>         | Mandibular Movement Case - Clo... | MEDIT                                                                                          | 2023-04-24 PM 1:59 | 1.75 GB   | Upload Required | 🗑 |
| <input type="checkbox"/>         | 서라_Mandibular Movement_TEST       | Mandibular Movement_export_test                                                                | 2023-04-10 PM 3:39 | 34.73 MB  | Upload Required | 🗑 |
| <input type="checkbox"/>         | 서라_Mandibular Movement_TEST...    | Mandibular Movement_export_test                                                                | 2023-04-10 PM 3:39 | 731.43 MB | Upload Required | 🗑 |

Close

## Upload

|                                                                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  <b>Upload</b> | Faça upload dos casos selecionados.           |
|  <b>Cancel</b> | Cancele o upload dos casos selecionados.      |
|  <b>Retry</b>  | Tente novamente fazer o upload se ele falhar. |

## Download

|                                                                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <b>Download</b> | Faça download dos casos selecionados.           |
|  <b>Cancel</b>   | Cancele o download dos casos selecionados.      |
|  <b>Retry</b>    | Tente novamente fazer o download se ele falhar. |

## Sites relacionados

Você pode acessar diretamente menus disponíveis apenas no Medit Link Web, como My Info, Partners e Membership. Consulte Medit Link > Medit Link Web > [Partners](#), [Membership](#) e [My Info](#) para obter descrições detalhadas dos menus do Medit Link Web.

Você pode acessar a loja online da Medit, a Medit Shop, onde pode adquirir garantias estendidas para scanners e outros produtos da Medit, como mochilas para scanners.

Além disso, você pode obter várias informações sobre como usar o Medit Link. Acesse os recursos educacionais e informativos da Medit, como Centro de ajuda Medit, o canal do YouTube da Medit Academy e a plataforma de educação online Medit Academy.



**My Info**



**Partners**



**Membership**



**Shop**



**Help Center**



**YouTube**



**Academy**

## Visualizador de arquivos

O Visualizador de arquivos agrupa e mostra vários dados, incluindo os adquiridos de programas vinculados ao Medit Link e aqueles anexados pelos usuários.



Ele fornece funções básicas de gerenciamento, como exibir/ocultar dados, ajustar a opacidade e excluir dados.

Ele suporta pré-visualizações de arquivos nos seguintes formatos:

- Dados 3D: STL, OBJ, PLY
- Imagens 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Arquivos de vídeo: MKV, MP4, AVI, WMV

## Árvore de dados

Você pode agrupar e exibir todos os dados do caso na árvore de dados. Também é possível exibir/ocultar dados, ajustar a transparência e excluir dados da árvore de dados.

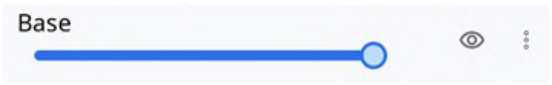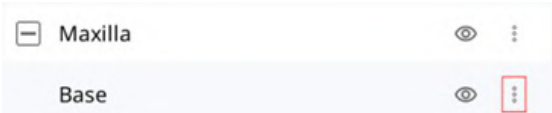
|                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Exibir / Ocultar | É possível exibir ou ocultar os dados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Opacidade        | <p>A barra deslizante aparece quando você clica em um dos dados na árvore de dados. Você pode ajustar a opacidade dos dados exibidos movendo a barra deslizante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Mais             | <p>Clicar no ícone Mais mostra os recursos adicionais disponíveis.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Exibir somente este: Oculta todos os outros dados e exibir apenas os dados correspondentes.</li><li>• Ocultar: Oculta os dados.</li><li>• Duplicar: Copia os dados e os adiciona ao grupo de anexos.</li><li>• Exportar: Exporta os arquivos selecionados.</li><li>• Mudar o nome: Altera o nome dos dados.</li><li>• Excluir: Exclui os dados.</li></ul> |



### Observação

Você pode mudar o nome dos dados quando está online.

## Ferramentas de controle de modelo

## Controles de modelo 3D
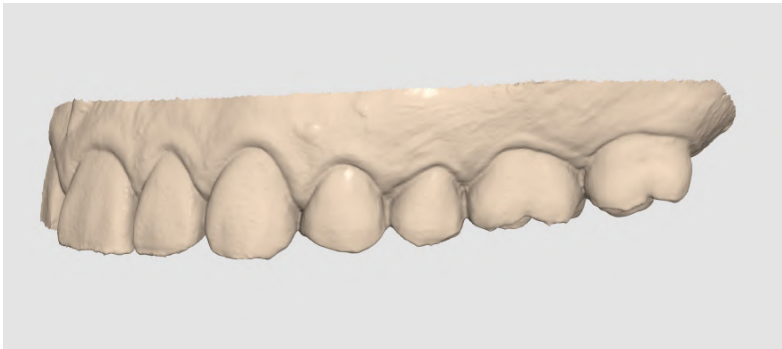
|   |                            |                                                                                      |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| + | Panorâmico                 | Move o modelo.                                                                       |
| ↺ | Rotacionar                 | Rotaciona o modelo.                                                                  |
| 🔍 | Aumentar/Diminuir zoom     | Aumenta e diminui o zoom do modelo.                                                  |
| 📏 | Ajuste de zoom             | Posiciona o modelo no centro da tela.                                                |
| 🌈 | Modo de exibição dos dados | Brilhante                                                                            |
|   |                            | Exibe os dados em cores com acabamento brilhante (renderização PBR).                 |
|   |                            |    |
| 🌈 |                            | Fosco                                                                                |
|   |                            | Exibe os dados em cores com acabamento fosco (renderização Phong).                   |
|   |                            |   |
| 🟤 |                            | Monocromático                                                                        |
|   |                            | Exibe os dados em uma cor.                                                           |
|   |                            |  |
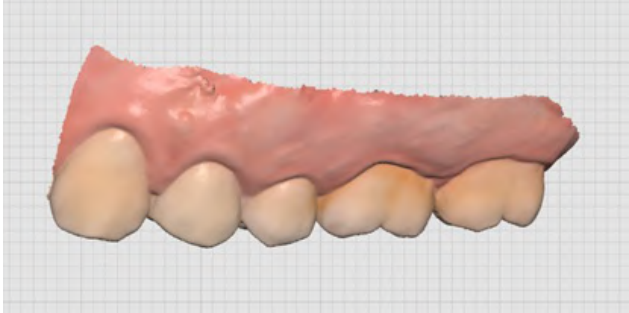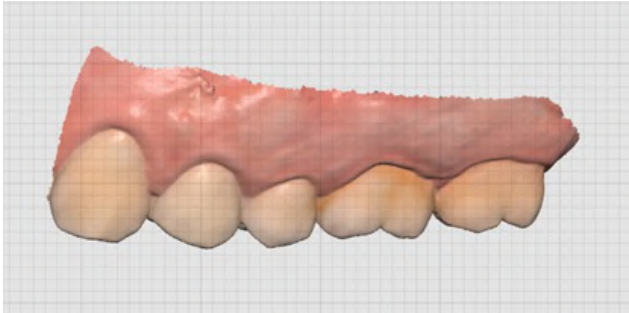
|                                                                                   |                             |                 |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Configurações da grade (mm) | Ativar grade    | <p>Mostra a grade no fundo.</p>                   |
|                                                                                   |                             | Desativar grade | <p>Oculto a grade no fundo.</p>                                                                                                     |
|                                                                                   |                             | Ativar overlay  | <p>Aplica overlay da grade sobre o modelo.</p>  |

## Controle de imagem 2D


|                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Próxima imagem/Imagem anterior | Move entre imagens.                                                                                                                                                                                           |
|  | Editar                         | Edita a imagem.                                                                                                                                                                                               |
|  | Pinçar/Colar janela            | <p>Você pode destacar a janela de imagem e ajustá-la na posição desejada. Você pode redimensionar a janela.</p> <p>Quando a janela é restaurada ao seu local original, ela retorna ao seu tamanho padrão.</p> |

## Ferramentas de função

## Captura de imagens e nota


Capture a tela atual como imagem 2D, desenhe nela ou adicione avisos.


Você pode salvá-la como um arquivo com seus avisos e enviá-la como referência.

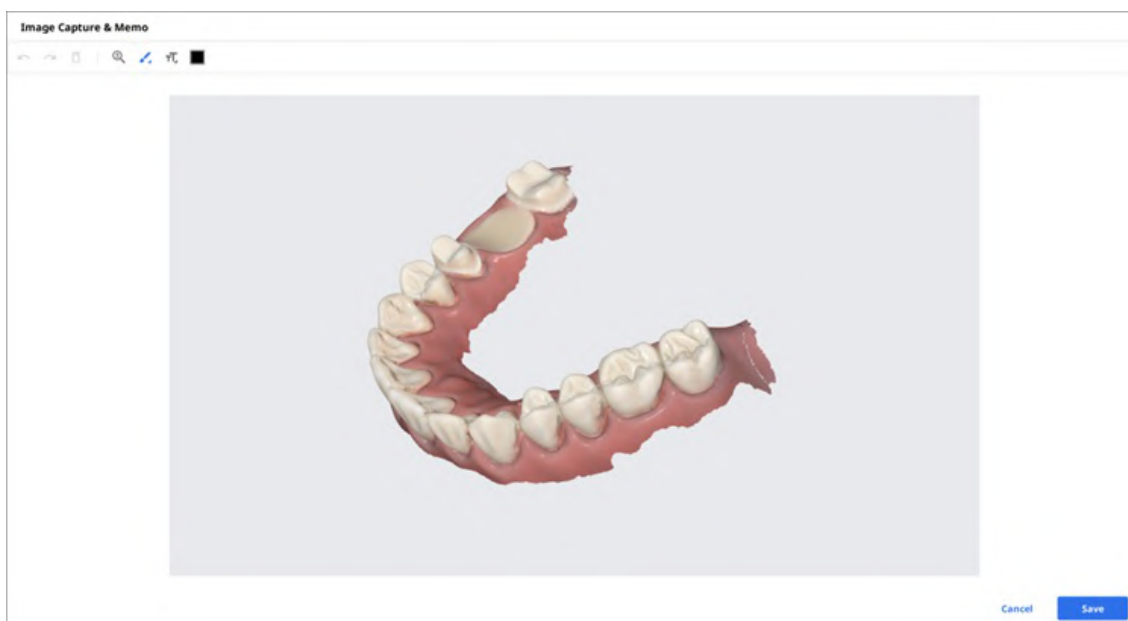

## Captura de ortodontia

Capture as imagens na direção de visualização atual e superior/inferior/esquerda/direita a partir da direção de visualização atual.

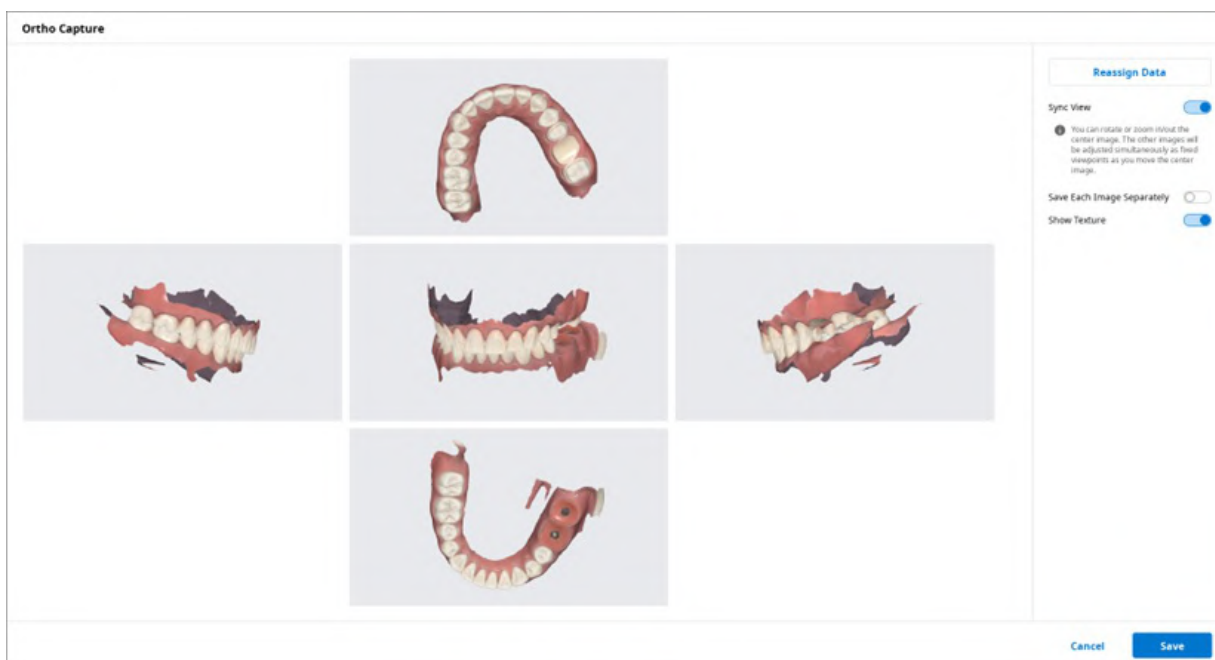
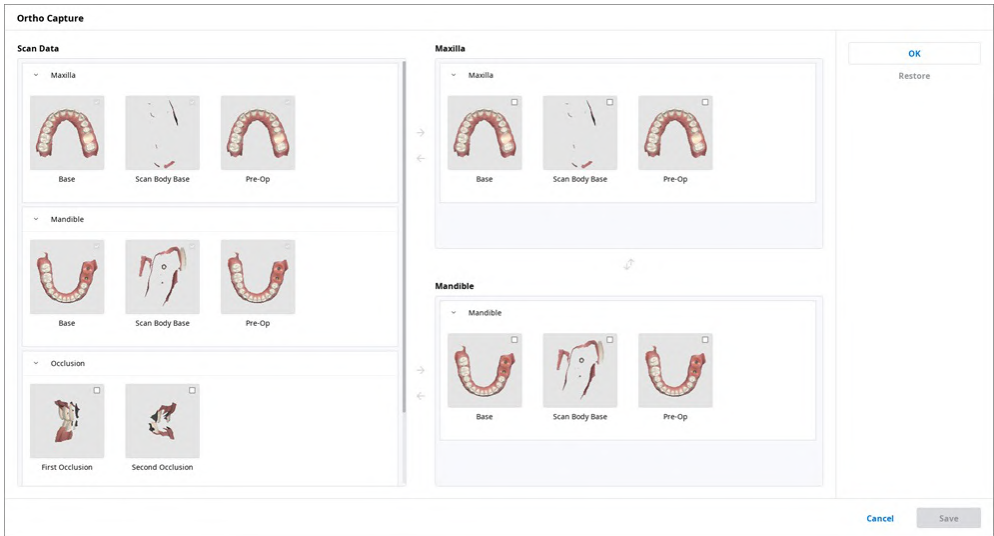
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sincronizar visualização         | <p>Quando ativada, você pode girar ou ampliar/diminuir o zoom da imagem central. As outras imagens serão ajustadas simultaneamente como pontos de vista fixos conforme você move a imagem central.</p> <p>Quando desativada, você pode usar uma imagem panorâmica, rotacionar ou aumentar/diminuir o zoom de todas as imagens individualmente.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| Salvar cada imagem separadamente | <p>Salve cada imagem com alta resolução.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Exibir textura                   | <p>Ativa/desativa a textura do modelo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reatribuir os dados              | <p>Altere os dados de maxila/mandíbula com a funcionalidade Reatribuir os dados. Você pode usar os dados alterados para criar e utilizar as imagens resultantes de Captura de ortodontia.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dados de escaneamento: Todos os dados de escaneamento do caso são exibidos.</li> <li>• Maxila: Os dados que você selecionou para a maxila são exibidos.</li> <li>• Mandíbula: Os dados que você selecionou para a mandíbula são exibidos.</li> </ul> |


## Preencher buracos

Preencha buracos em dados de malha 3D.



## Recorte


O Recorte fornece várias ferramentas para editar dados.

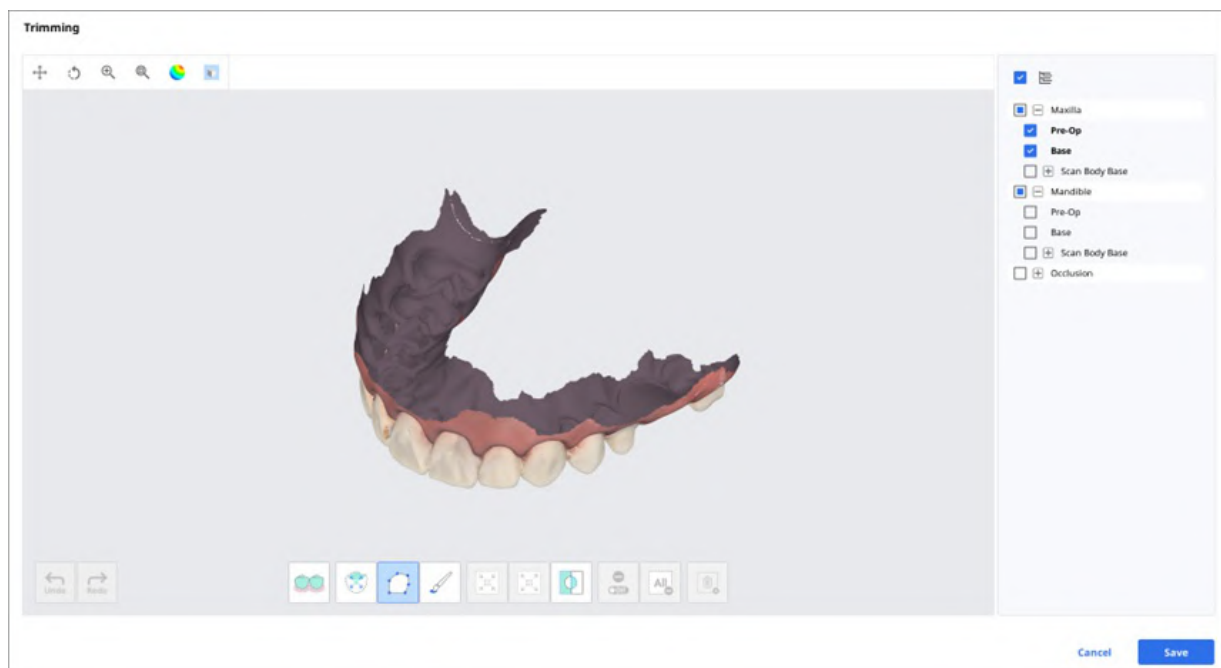

Os dados de malha 3D selecionados podem ser editados utilizando diferentes ferramentas localizadas no canto inferior da janela.

|                            |                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seleção                    |    | Seleção inteligente dos dentes  | <p>Seleciona automaticamente todos os dentes da arcada, removendo as partes da gengiva.</p> <div>  <b>Observação</b><br/>           Essa função está disponível apenas para dados de escaneamento adquiridos usando o Medit Scan for Clinics com a opção "Usar GPU" ativada.         </div> |
|                            |    | Seleção inteligente do dente    | Seleciona automaticamente a área de um único dente com um clique. Você pode clicar ou arrastar no dente.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            |    | Seleção de polilinhas           | Seleciona todas as entidades dentro de uma forma de polilinha desenhada na tela.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            |    | Seleção em pincel               | Seleciona todas as entidades na tela em um caminho desenhado à mão. Apenas a vista frontal será selecionada. O pincel vem em três tamanhos.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ajuste da área selecionada |    | Encolher a área selecionada     | Reduz a área selecionada cada vez que você pressiona o botão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |  | Expandir a área selecionada     | Expande a área selecionada cada vez que você pressiona o botão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            |  | Inverter a área selecionada     | Inverte a seleção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cancelamento de seleção    |  | Seleção/Cancelamento de seleção | Quando ativa, cancela a seleção da área utilizando várias ferramentas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |  | Limpar toda a seleção           | Limpa todas as áreas selecionadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |  | Excluir a área selecionada      | Exclui os dados da área selecionada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

1. Selecione a área que deseja recortar com as ferramentas de seleção de área.

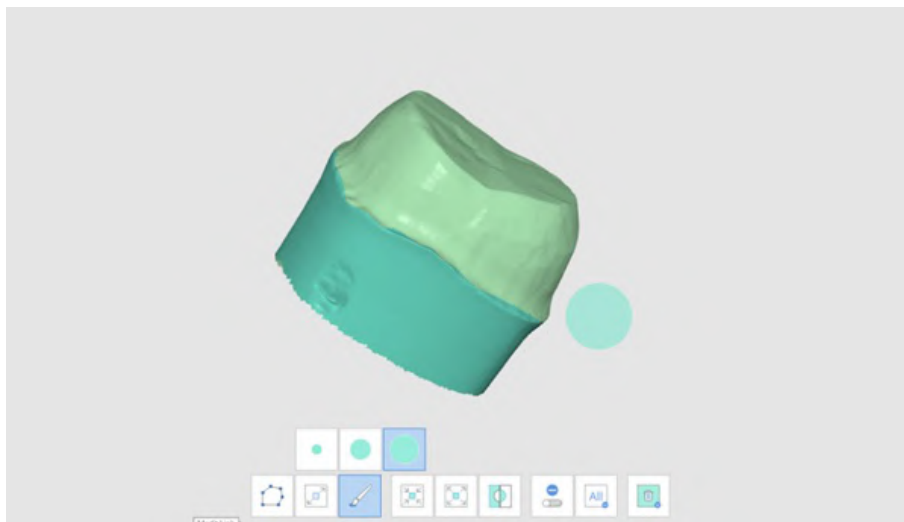


### Observação


A ferramenta de recorte de polilinha seleciona todas as entidades dentro de uma forma de polilinha desenhada na tela, enquanto a ferramenta de recorte por pincel seleciona apenas os dados faciais frontais.

2. É possível inverter, encolher ou expandir a seleção com as três ferramentas a seguir.


- Inverter a área selecionada

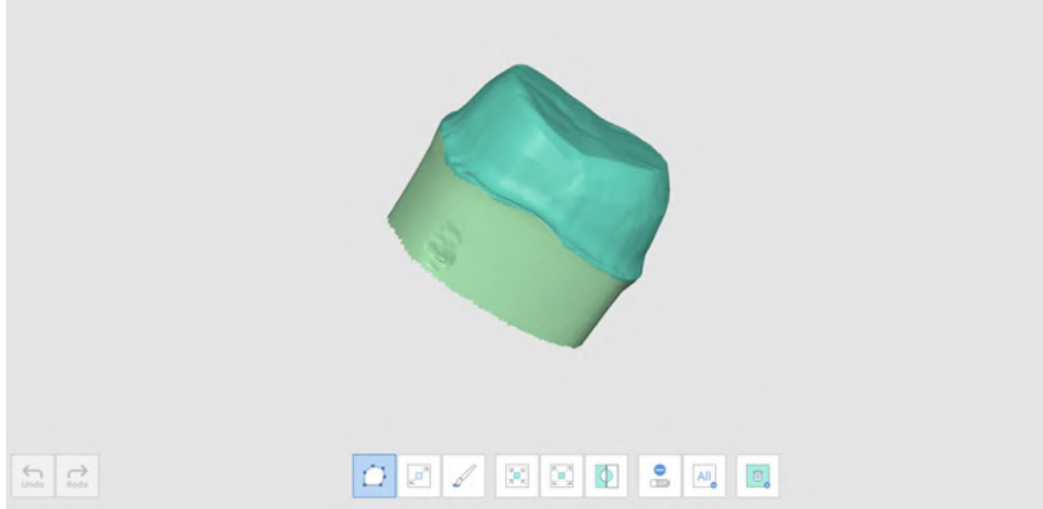

- Encolher a Área Selecionada

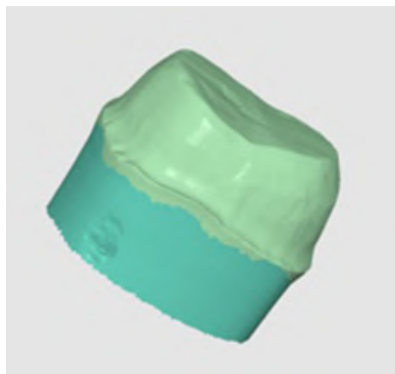


- Expandir a Área Selecionada

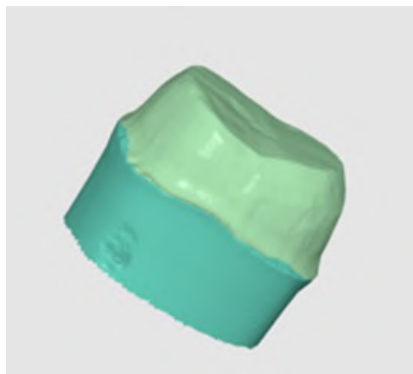






3. Você pode cancelar a seleção das áreas selecionadas com a ferramenta Excluir a área selecionada.

## Otimizar alinhamento da oclusão

Otimize o alinhamento da oclusão. Você pode escolher os dados-alvo e ajustar o alinhamento da oclusão.

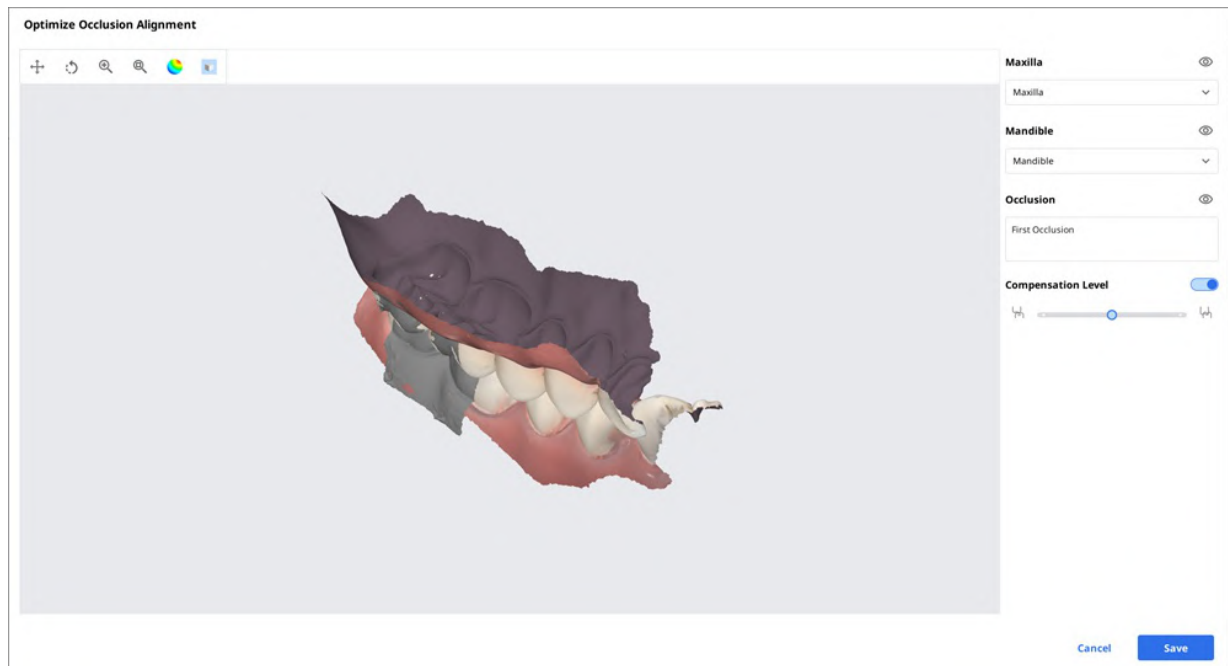


**Nível de compensação**
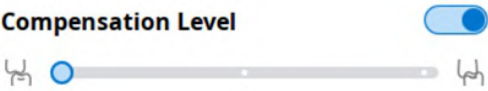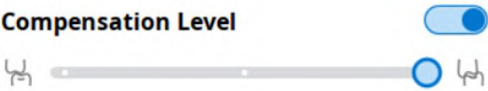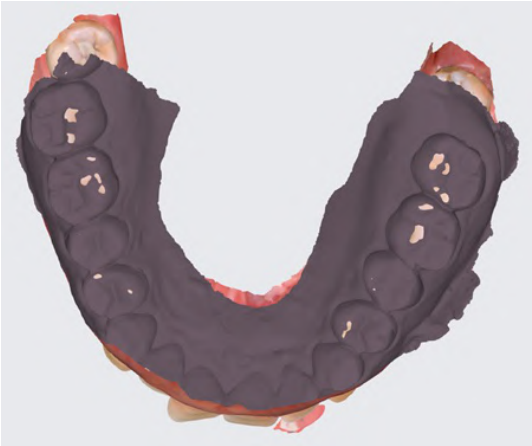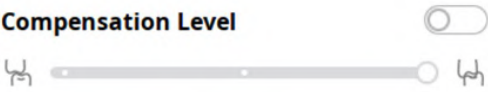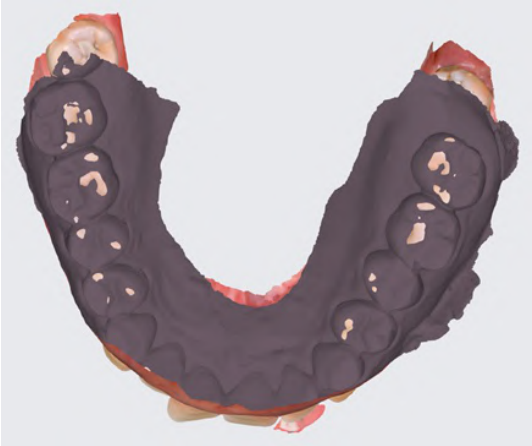
|           |                                                                                                                             |                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Baixo     | <p><b>Compensation Level</b></p> <p></p>   |    |
| Médio     | <p><b>Compensation Level</b></p> <p></p>   |   |
| Alto      | <p><b>Compensation Level</b></p> <p></p> |  |
| Desligado | <p><b>Compensation Level</b></p> <p></p> |  |

## Movimento mandibular

Você pode reproduzir os movimentos mandibulares gravados no Medit Scan for Clinics para ver os contatos de oclusão dinâmicos entre as dentições superior e inferior.

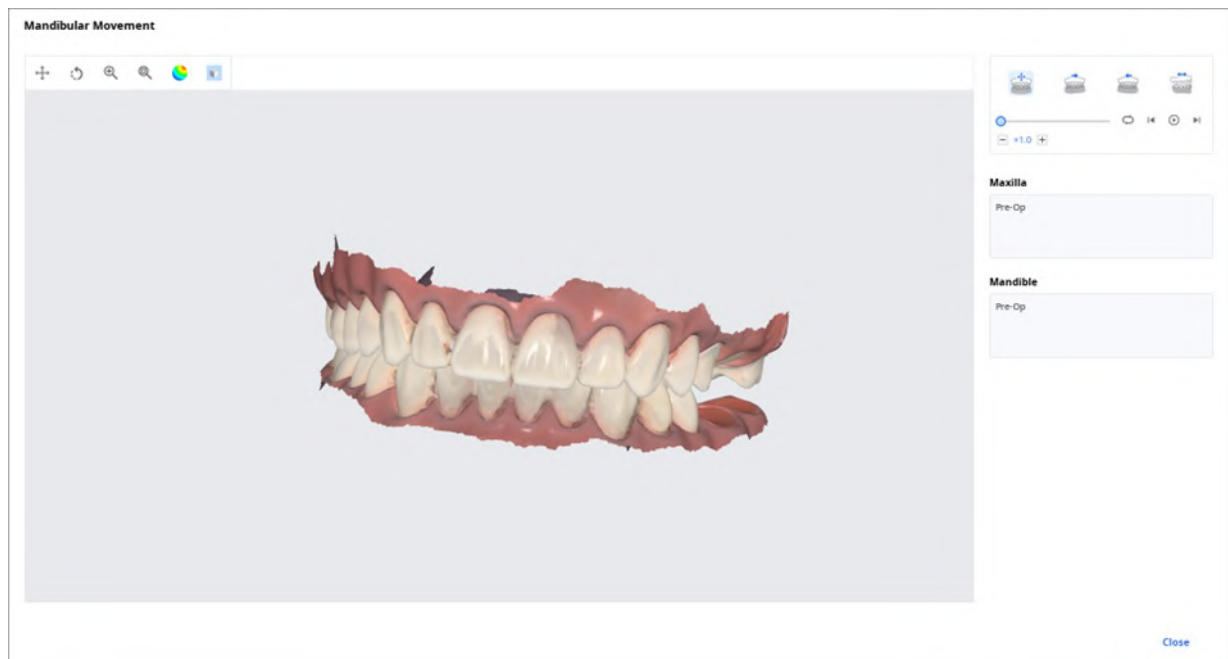

|  |                            |                                                              |
|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | Movimento livre            | Reproduz a gravação do movimento mandibular livre.           |
|  | Movimento lateral esquerdo | Reproduz a gravação da mandíbula movendo-se para a esquerda. |
|  | Movimento lateral direito  | Reproduz a gravação da mandíbula movendo-se para a direita.  |
|  | Movimento protrusivo       | Reproduz a gravação da mandíbula movendo-se para a frente.   |

## Gerenciamento dos dados multioclusão no Visualizador de arquivos

Você pode obter vários resultados de dados de oclusão do aplicativo Medit Scan.

O Medit Link fornece a função de gerenciar os resultados por meio do "Visualizador de arquivos".

### Como gerenciar vários resultados


Quando o usuário obtém vários resultados de oclusão do Medit Scan for Clinics, o Medit Link oferece a opção de selecionar um resultado.

A lista de resultados é ordenada por nome e você pode selecionar um item.

O modelo selecionado será exibido na "Árvore de dados" e na "Área de exibição do modelo".



Você pode recolher a lista e alterar o item usando os ícones de seta.

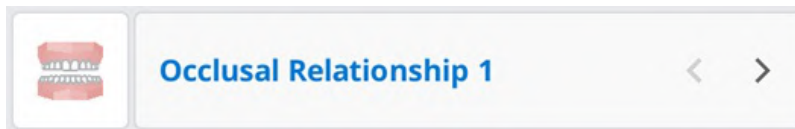

## Opções de visualização

Você pode alterar as Opções de visualização para personalizar os layouts da lista de casos em Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

### View Options

|                                                                                     |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|    | <b>Status Filters</b> | 2 in use >           |
|    | <b>Table Items</b>    | 8 in use >           |
|    | <b>View Type</b>      | List View >          |
|  | <b>Grouping</b>       | None >               |
|  | <b>Sorting</b>        | Last Modified Date > |

## Filtros do estado

Exibe ou oculta cada filtro que representa o estado do caso. Os filtros com estado oculto não são exibidos na tela da Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Fica fácil encontrar o caso que você precisa com os filtros do estado.

- Você pode clicar no estado que deseja visualizar para exibir apenas os casos nesse estado.
- É possível selecionar vários estados ao mesmo tempo.

Para cada caixa, estão disponíveis as seguintes opções de filtragem:

| Caixa     | Filtros do estado                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Case Box  | All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed |
| Order Box | All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed           |
| In Box    | All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed   |
| Work Box  | All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done                     |

## Itens da tabela

Selecione os itens a exibir na lista de casos em Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Você pode alterar a ordem dos itens da tabela ou ajustar a largura da coluna da tabela na visualização em lista para otimizar o ambiente do usuário.

Para cada caixa, estão disponíveis os seguintes itens de tabela:

| Caixa     | Itens da tabela                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patient   | Nome do paciente / ID do paciente / Gênero / Número de casos / Data de registro / Data de nascimento / Data de escaneamento mais recente                                    |
| Case Box  | Estado / Nome do caso / Data de nascimento / Informações do formulário / Modificado em / Data de escaneamento / Data do pedido / Nome do laboratório                        |
| Order Box | Estado / Nome do caso / Nome do paciente / Data de escaneamento / Data do pedido / Nome do laboratório / Data de entrega solicitada / Modificado em                         |
| In Box    | Estado / Nome do caso / Data do pedido / Data de entrega solicitada / Modificado em / Nome da clínica                                                                       |
| Work Box  | Estado / Nome do caso / Nome do paciente / Informações do formulário / Modificado em / Data de entrega solicitada / Data de escaneamento / Nome da clínica / Data do pedido |

## Tipo de visualização

Altere o tipo de visualização de Visualização em galeria para Visualização em lista, e vice-versa, na Case Box.

Para cada caixa, estão disponíveis as seguintes opções de tipo de visualização:

| Caixa     | Opções de tipo de visualização                  |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Patient   | Visualização em lista                           |
| Case Box  | Visualização em lista / Visualização em galeria |
| Order Box | Visualização em lista                           |
| In Box    | Visualização em lista                           |
| Work Box  | Visualização em lista                           |

## Agrupamento

Selecione uma opção de agrupamento para classificar e reorganizar os casos na lista pela opção selecionada.

Para cada caixa, estão disponíveis as seguintes opções de agrupamento:

| Caixa     | Opções de agrupamento                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Case Box  | Nenhum / Nome do paciente / Data de escaneamento / Data do pedido           |
| Order Box | Nenhum / Data de escaneamento / Data do pedido / Data de entrega solicitada |
| In Box    | Nenhum / Data do pedido / Data de entrega solicitada                        |
| Work Box  | Nenhum / Data de entrega solicitada                                         |

### Observação

As opções de agrupamento estão indisponíveis em Patient, Case Talk e Trash Box.

## Ordenação

Selecione uma opção de ordenação para alterar a ordem dos casos na lista de acordo com a opção selecionada.

Para cada caixa, estão disponíveis as seguintes opções de ordenação:

| Caixa     | Agrupamento                | Opções de ordenação                                                                                                             |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patient   | -                          | Nome do paciente / ID do paciente / Data de nascimento / Data de registro / Número de casos / Data de escaneamento mais recente |
| Case Box  | Nenhum                     | Nome do paciente / Modificado em / Data de escaneamento / Data do pedido / Nome do laboratório                                  |
|           | Nome do paciente           | Modificado em / Data de escaneamento / Data do pedido / Nome do laboratório                                                     |
|           | Data de escaneamento       | Nome do paciente / Modificado em / Data do pedido / Nome do laboratório                                                         |
|           | Data do pedido             | Nome do paciente / Modificado em / Data de escaneamento / Nome do laboratório                                                   |
| Order Box | Nenhum                     | Nome do paciente / Data de escaneamento / Data do pedido / Data de entrega solicitada / Nome do laboratório                     |
|           | Data de escaneamento       | Nome do paciente / Data do pedido / Data de entrega solicitada / Nome do laboratório                                            |
|           | Data do pedido             | Nome do paciente / Data de escaneamento / Data de entrega solicitada / Nome do laboratório                                      |
|           | Data de entrega solicitada | Nome do paciente / Data de escaneamento / Data do pedido / Nome do laboratório                                                  |
| In Box    | Nenhum                     | Nome do paciente / Data do pedido / Data de entrega solicitada / Nome da clínica                                                |
|           | Data do pedido             | Nome do paciente / Data de escaneamento / Data de entrega solicitada / Nome da clínica                                          |
|           | Data de entrega solicitada | Nome do paciente / Data do pedido / Nome da clínica                                                                             |
| Work Box  | Nenhum                     | Nome do paciente / Modificado em / Data de entrega solicitada / Nome da clínica                                                 |
|           | Data de entrega solicitada | Nome do paciente / Modificado em / Nome da clínica                                                                              |


#### Observação

As opções de ordenação estão indisponíveis em Case Talk e Trash Box.

# Filtragem e pesquisa

## Filtrar por paciente

Filtre e exiba os casos por nome do paciente. É possível criar uma lista filtrando apenas os pacientes nos quais você precisa trabalhar.

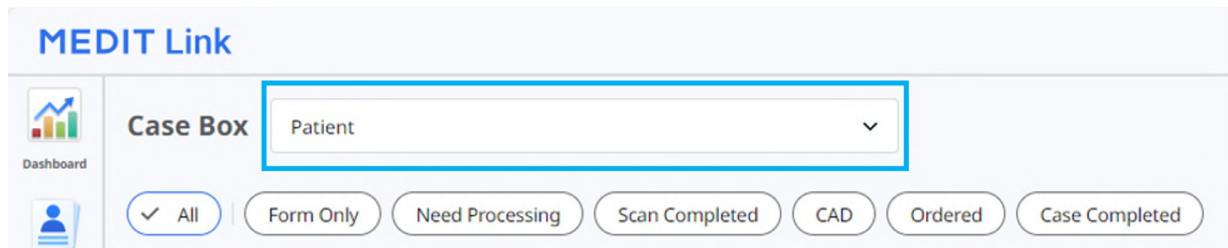


MEDIT Link

Case Box Patient

Dashboard

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. Insira um nome de paciente.

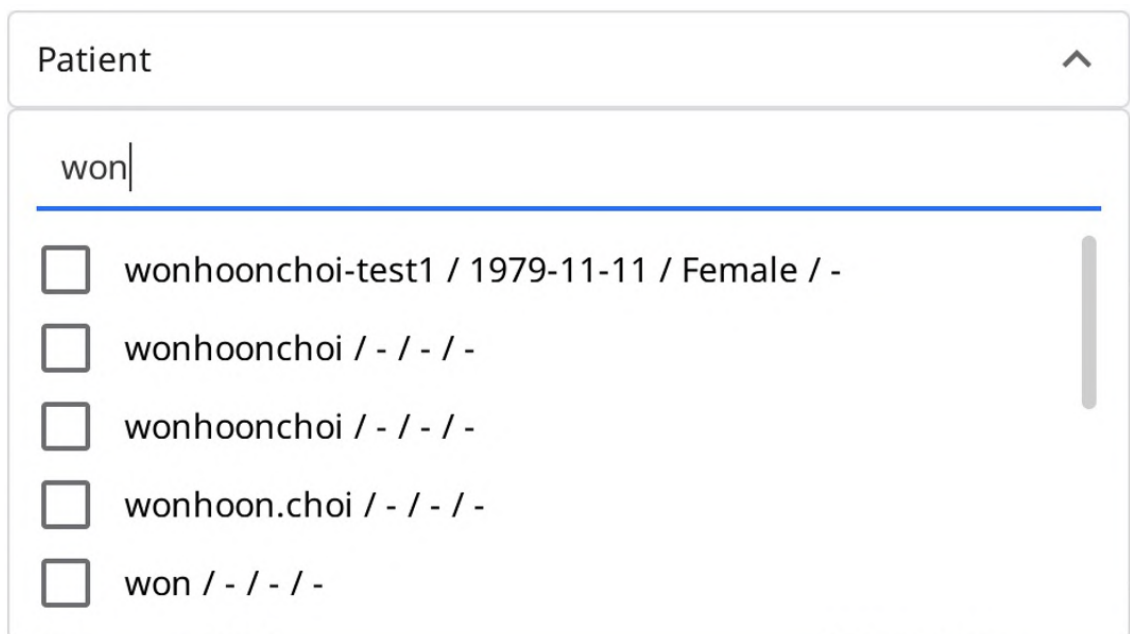

Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Selecione os pacientes entre os resultados da pesquisa abaixo.

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2 ^

won|

☐

wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -

☐

wonhoonchoi / - / - / -

☐

won / - / - / -

☐

wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234

☐

won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

☒

wonhoonchoi / - / - / -

☒

wonhoon.choi / - / - / -

☒

WonHoonChoi / - / - / -

3. Somente os casos dos pacientes selecionados são exibidos na lista.

MEDIT Link 3.2.0

Wonhoon Choi Clinic

Case Box

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2

All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Case Completed

2018-01-01-2023-10-24

All / Contains

Total Cases: 20

| Status          | Patient Name | Case Name                       | Form Information                                       | Last Modified Date  | Scan Date          | Lab Name | Order Date |
|-----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|------------|
| Form Only       | wonhoonchoi  | originalCase                    | -                                                      | 2023-10-05 오전 8:10  |                    |          |            |
| Form Only       | wonhoonchoi  | wonhoonchoi's Case              | -                                                      | 2023-10-05 오전 8:09  |                    |          |            |
| Scan Completed  | wonhoonchoi  | FileViwerTest_1                 | 8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...   | 2023-06-15 오전 8:14  | 2023-02-09 오전 8:35 |          |            |
| Scan Completed  | wonhoonchoi  | FileViwerTest_1 - Clone         | 2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8... | 2023-05-25 오후 2:05  | 2023-02-09 오전 8:35 |          |            |
| Form Only       | wonhoonchoi  | FileViwerTest_1 - Clone         | 8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...   | 2023-03-15 오후 3:06  |                    |          |            |
| Scan Completed  | wonhoonchoi  | FileViwerTest_1 - Clone - Clone | 8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...   | 2023-03-09 오후 4:41  | 2023-02-09 오전 8:35 |          |            |
| Need Processing | wonhoonchoi  | FileViwerTest_1 - Clone         | 8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...   | 2023-02-14 오전 8:13  | 2023-02-09 오전 8:35 |          |            |
| Scan Completed  | wonhoonchoi  | FileViwerTest_1 - Clone         | 8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...   | 2023-02-10 오전 11:27 | 2023-02-09 오전 8:35 |          |            |
| Form Only       | wonhoonchoi  | testsamplecase                  | -                                                      | 2023-02-10 오전 7:39  |                    |          |            |
| Scan Completed  | wonhoonchoi  | Multi Occlusion                 | -                                                      | 2023-02-09 오전 9:26  | 2023-02-09 오전 9:01 |          |            |
| Scan Completed  | wonhoonchoi  | FileViwerTest_1 - Clone - Clone | 8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...   | 2023-02-09 오전 8:50  | 2023-02-09 오전 8:35 |          |            |
| Case Completed  | wonhoonchoi  | wonhoonchoi's Case              | 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay                         | 2022-10-13 오후 10:30 | 2022-10-11 오후 5:16 |          |            |
| Case Completed  | wonhoonchoi  | wonhoonchoi's Case              | -                                                      | 2022-10-13 오후 10:28 |                    |          |            |

## Filtrar por data

Filtre e exiba casos modificados pela última vez dentro da duração definida.

1. Clique no filtro de duração.

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Selecione a duração na lista.

- Todos: Exibe todos os casos.
- Intervalo personalizado: Especifica as datas de início e término para exibir casos modificados pela última vez dentro desse período.
- Hoje: Exibe os casos modificados pela última vez hoje.
- Ontem: Exibe casos modificados pela última vez ontem.
- Últimos 7 dias: Exibe casos modificados pela última vez nos últimos 7 dias, exceto hoje.
- Últimos 30 dias: Exibe casos modificados pela última vez nos últimos 30 dias, exceto hoje.
- Este mês: Exibe os casos modificados pela última vez durante este mês.
- Mês anterior: Exibe os casos modificados pela última vez no último mês.

A lista de casos será atualizada em tempo real com os casos criados ou modificados pela última vez dentro da duração selecionada.

## Recursos avançados de pesquisa

Aproveite os recursos de pesquisa para encontrar rapidamente as informações que deseja.

All

▼

Search / Contains

🔍

Os seguintes Critérios de pesquisa estão disponíveis para cada caixa:

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patient            | Tudo, Nome do paciente, ID do paciente                                                                |
| Case Box           | Todos, Nome do caso, Nome do paciente, ID do paciente, Informações do formulário, Nome do laboratório |
| Order Box          | Todos, Nome do caso, Nome do paciente, ID do paciente, Nome do laboratório, ID do pedido              |
| In Box             | Todos, Nome do caso, Nome do paciente, Nome da clínica, ID do pedido                                  |
| Work Box           | Todos, Nome do caso, Nome do paciente, Informações do formulário, Nome da clínica, ID do pedido       |
| Case Talk          | Nome do Case Talk (Contém), Nome do paciente (Igual a)                                                |
| Trash Box (Clinic) | Todos, Nome do caso, Nome do paciente, Nome do laboratório, Excluído por                              |
| Trash Box (Lab)    | Todos, Nome do caso, Nome do paciente, Nome da clínica, Excluído por                                  |

É possível selecionar os Critérios de pesquisa e escolher entre as lógicas Contém ou Igual a.

All

▼

All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains


☐ Equals

# Criar/Editar/Clonar/Excluir caso

## Criar casos

### Criar casos na Case Box (Clínica)

1. Clique no botão "Novo caso" no canto superior direito.

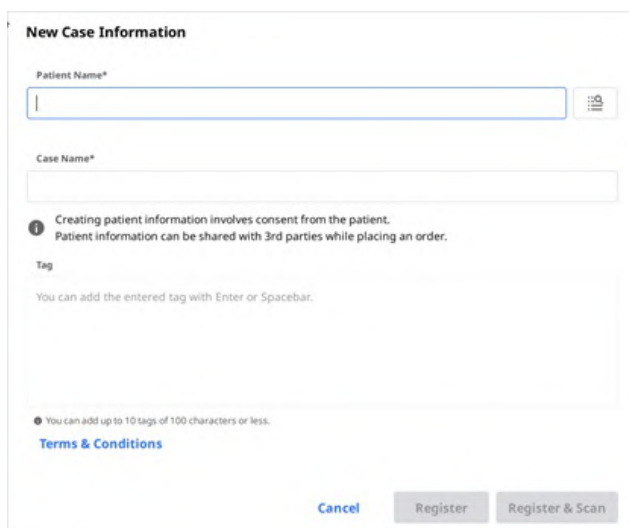

The form titled "New Case Information" contains the following fields and elements:


- Patient Name\***: A text input field with a dropdown icon on the right.
- Case Name\***: A text input field.
- Information**: A note stating "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A text input field with a hint "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- Footer**: A note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less." and a link "Terms & Conditions".
- Buttons**: "Cancel", "Register", and "Register & Scan".

2. Insira informações básicas, como o nome do paciente e o nome do caso.

- Se você inserir um nome que não esteja na lista de pacientes, um novo paciente será adicionado.
- Se você inserir um nome que está na lista de pacientes, poderá selecioná-lo nela.
- Se registrar um caso para um paciente existente, clique no ícone Lista de pacientes para selecionar um paciente existente.



- Na caixa de diálogo Lista de pacientes, você pode registrar um novo paciente ou editar as informações de um paciente existente.

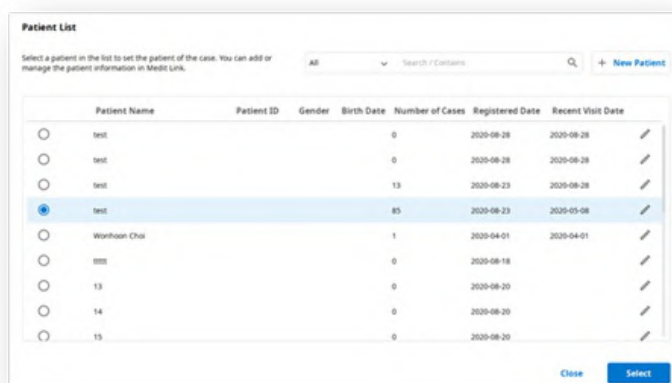

The "Patient List" dialog box displays a table of existing patients. At the top, there is a search bar and a "+ New Patient" button. The table has the following columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Birth Date, Number of Cases, Registered Date, and Recent Visit Date. The fourth row is highlighted.

| Patient Name | Patient ID | Gender | Birth Date | Number of Cases | Registered Date | Recent Visit Date |
|--------------|------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| test         |            |        |            | 0               | 2020-08-28      | 2020-08-28        |
| test         |            |        |            | 0               | 2020-08-28      | 2020-08-28        |
| test         |            |        |            | 13              | 2020-08-23      | 2020-08-28        |
| test         |            |        |            | 85              | 2020-08-23      | 2020-05-08        |
| Wonhoon Choi |            |        |            | 1               | 2020-04-01      | 2020-04-01        |
| test         |            |        |            | 0               | 2020-08-18      |                   |
| 13           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |
| 14           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |
| 15           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |

3. O nome do caso será preenchido automaticamente, mas você ainda poderá alterá-lo.
4. Clique em "Registrar e escanear" para concluir o registro do caso e proceder com o escaneamento.
  - **Registrar**: Você será redirecionado para a página principal. Isso é útil ao registrar vários casos.
  - **Registrar e escanear**: Acesse a guia Formulário para registrar as informações do formulário do

caso.

## Criar casos na Work Box (Laboratório)

1. Clique no botão "Novo caso" no canto superior direito.

The screenshot shows a form titled "New Case Information" with the following fields and controls:

- Clinic Name\***: A dropdown menu with a downward arrow icon.
- Patient Name\***: A text input field.
- Case Name\***: A text input field.
- Requested Delivery Date**: A date picker showing "2023-04-13".
- Tag**: A text area with the placeholder text "You can add the entered tag with Enter or Spacebar."
- A note at the bottom left: "● You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" (blue text) and "Register" (grey button).

2. Insira ou selecione o nome da clínica.
3. Insira o nome do paciente e o nome do caso. O nome do caso será preenchido automaticamente, mas você ainda poderá alterá-lo.
4. Informe a data de entrega estimada considerando a data de conclusão do trabalho.
5. Após registrar o caso, você será redirecionado para a página principal.

## Editar casos

### Editar casos na Case Box (Clínica)

1. Clique no ícone "Editar" ao lado do nome do caso.

**Edit Case Information**

Patient Name\*

Test Occlusion 

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name\*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.  
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. Clique no ícone "Pesquisar" para alterar o nome do paciente. Observe que ele não pode ser editado diretamente. Em vez disso, você pode encontrar um nome de paciente pelo qual gostaria de substituir o atual e editar as informações do paciente na lista.

**Patient List**

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All   [+ New Patient](#)

|                                  | Patient Name | Patient ID | Gender | Birth Date | Number of Cases | Registered Date | Recent Visit Date |                                                                                       |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 0               | 2020-08-28      | 2020-08-28        |  |
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 0               | 2020-08-28      | 2020-08-28        |  |
| <input checked="" type="radio"/> | test         |            |        |            | 13              | 2020-08-23      | 2020-08-28        |  |
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 85              | 2020-08-23      | 2020-05-08        |  |
| <input type="radio"/>            | Wonhaen Choi |            |        |            | 1               | 2020-04-01      | 2020-04-01        |  |
| <input type="radio"/>            | ttttt        |            |        |            | 0               | 2020-08-18      |                   |  |
| <input checked="" type="radio"/> | 13           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |  |
| <input type="radio"/>            | 14           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |  |
| <input type="radio"/>            | 15           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |  |

[Close](#) [Select](#)

3. Verifique o nome do paciente pelo qual você gostaria de substituir o atual.
4. Para criar um paciente, pressione o botão "Novo paciente".
5. Use o botão "Editar" para alterar as informações registradas sobre o paciente.
6. Clique em "Aplicar" para terminar o processo.

## Editar casos na Work Box (Laboratório)

1. Clique no ícone "Editar" ao lado do nome do caso.

**Edit Case Information**

Clinic Name\*

test

Patient Name\*

test

Case Name\*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Clique em "Aplica" depois de concluir a edição.

### Observação

Você não pode editar as informações dos casos recebidos por meio do pedido na In Box.

## Clonar casos

### Clonar caso na Case Box (Clínica)

1. Clique no ícone "Clonar" na parte superior.



2. Será perguntado o tipo de informação que você gostaria de clonar para o novo caso.

**Information**

 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Escolha se deseja replicar apenas as informações do formulário ou todos os dados.
4. Quando a clonagem estiver concluída, será criado um caso chamado "[Nome do caso] – Clone".

### Clonar caso na Work Box (Laboratório)

1. Clique no ícone "Clonar" na parte superior.



2. Duplique todos os dados para criar um caso.
3. Quando a clonagem estiver concluída, será criado um caso chamado "[Nome do caso] – Clone".


## Excluir caso

### Excluir caso (Clínica e Laboratório)

1. Clique no ícone "Excluir".



2. Clique em "OK" para excluir o caso.

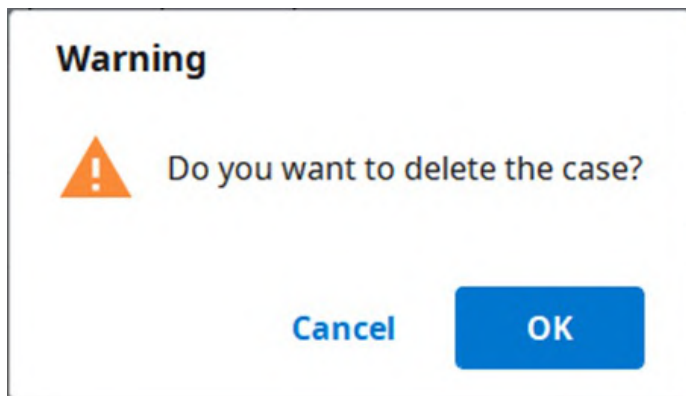

3. Os casos excluídos são movidos para a Trash Box e podem ser recuperados, se necessário.

## Informações do formulário

Você pode inserir as informações do formulário com base no programa conectado e no tipo de tratamento.

As informações inseridas serão usadas como informações básicas para trabalhar em programas de escaneamento ou CAD e ao fazer pedidos.

## Registrar informações do formulário na Case Box

### Inserir na guia Formulário

1. Selecione se deseja inserir informações de tratamento por dente ou por arcada.
2. Selecione Tipo – Método – Material – Tonalidade.
  - Se tiver inserido as informações incorretamente, volte para selecioná-las novamente.
  - As informações selecionadas são registradas automaticamente na lista de pedidos.
3. Clique em "Salvar" para salvar seu registro.

## Registrar informações do formulário na Work Box

### Inserir na guia Formulário


1. Selecione o programa de escaneamento que deseja usar.
2. Selecione uma das seguintes opções que definirão sua estratégia de escaneamento: Dentes/Multitroquel flexível/Multitroquel.
3. Os métodos podem ser diferentes dependendo do programa de escaneamento selecionado.

|                       | Medit Scan for Clinics | Medit Scan for Labs |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Dentes                | O                      | O                   |
| Arcada                | O                      | O                   |
| Multitroquel flexível | X                      | O                   |
| Multitroquel          | X                      | O                   |

4. Selecione números de dentes, arcada ou troquel para o processo de escaneamento.
5. Selecione Tipo – Método – Material – Tonalidade.
  - Se tiver inserido as informações incorretamente, volte para selecioná-las novamente.
  - As informações selecionadas são registradas automaticamente na lista de pedidos.
6. Clique em "Salvar" para salvar seu registro.

## Conectar dentes à ponte

Você pode conectar vários dentes em uma ponte quando o mesmo material é aplicado a vários dentes adjacentes. Clique no ícone da ponte ao lado dos dentes selecionados para conectá-los ou desconectá-los.

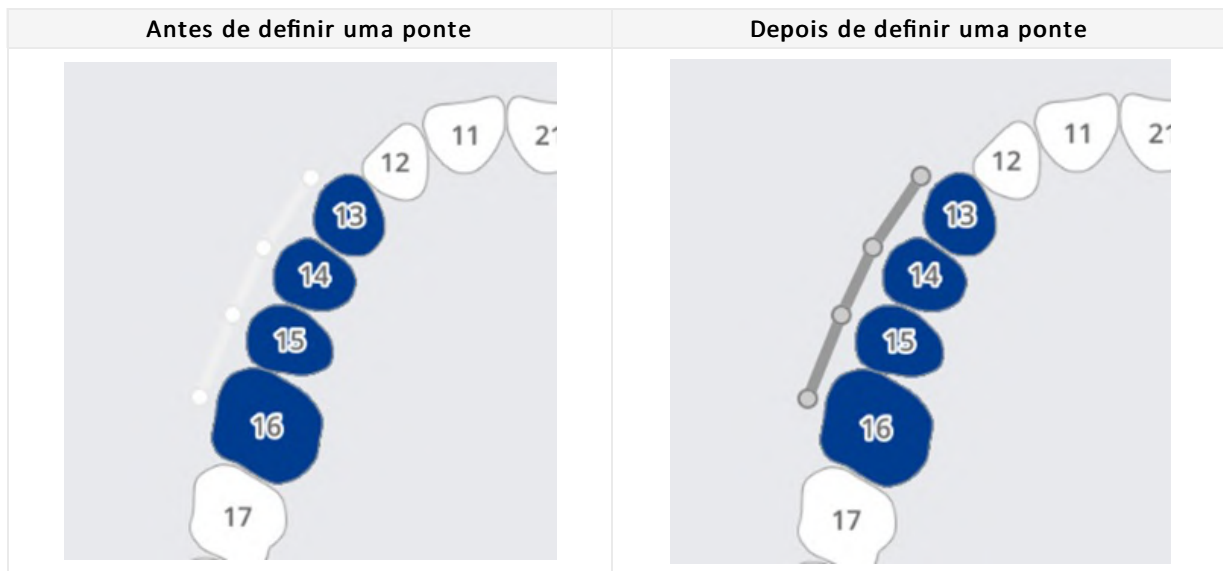

## Definição das opções de escaneamento

Dependendo do programa com o qual você está trabalhando, várias opções de escaneamento são fornecidas.

As opções de escaneamento selecionadas são repassadas para cada programa de escaneamento.

### Medit Scan for Labs

#### Opções gerais

|                                                                                     |                       |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dentes adjacentes     | Marca os dentes preparados e adjacentes e repassa essa informação para o programa de escaneamento.  |
|  | Antagonista           | Marca automaticamente o antagonista e passa a informação para o programa de escaneamento.           |
|  | Articulador           | Exibe as opções para selecionar o articulador no programa de escaneamento.                          |
|  | Marcador de movimento | Permite utilizar a estratégia de escaneamento "Movimento da mandíbula" no programa de escaneamento. |

#### Opções por dente

|                                                                                     |                             |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Scan body                   | Permite definir uma estratégia para escanear scan bodies no programa de escaneamento.              |
|  | Escaneamento pré-operatório | Permite definir uma estratégia para escanear um modelo pré-operatório no programa de escaneamento. |
|  | Escaneamento do enceramento | Permite definir uma estratégia para escanear enceramentos no programa de escaneamento.             |

## Adicionar aos favoritos

Você pode selecionar rapidamente um produto registrando-o como favorito.

A lista de favoritos registrados é gerenciada como um template e pode ser compartilhada por meio dos recursos de exportação e importação.

## Adicionar aos favoritos

1. Selecione o número do dente.
2. Selecione Tipo – Método – Material – Tonalidade.
  - Tipo – Método – Material – Tonalidades podem ser registrados como favoritos mesmo que nem todos estejam selecionados.
3. Clique no ícone de "Estrela".  

4. Uma combinação dos parâmetros selecionados, excluindo o número do dente, aparece em sua lista de pesquisa de favoritos.

## Gerenciar templates favoritos

Você pode registrar, gerenciar e compartilhar diferentes tipos de templates.

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Adicionar    | Adiciona um novo template.                |
| Mudar o nome | Muda o nome do template atual.            |
| Excluir      | Exclui o template atual.                  |
| Exportar     | Exporta o template atual para um arquivo. |
| Importar     | Importa um arquivo de template.           |

# Trabalhar em escaneamento/CAD

## Processo de escaneamento

Com base nas informações inseridas, prossiga com o escaneamento.

1. Insira/salve as informações do tratamento e selecione as opções de escaneamento necessárias.
2. Clique no botão "Escanear" no canto superior direito da janela.

## Processo de CAD


O Medit Link fornece o aplicativo de integração DentalCAD para conectar o Medit Link com o DentalCAD.

1. Instale o aplicativo DentalCAD Integration na App Box.
2. Acesse os detalhes do caso e clique no ícone do aplicativo DentalCAD Integration no Inicializador rápido.
3. Especifique o caminho para o aplicativo DentalCAD instalado no seu PC na caixa de diálogo pop-up.
4. Insira os detalhes do caso escaneado e clique no ícone do aplicativo DentalCAD Integration. Será aberta uma caixa de diálogo para criar um arquivo dentalProject.
5. Registre as informações do formulário do DentalCAD e clique em "Abrir" para abrir o programa CAD.
6. Se você instalar o aplicativo de integração DentalDB Integration, os resultados do CAD serão entregues automaticamente no caminho de salvamento especificado no exocad. (Apenas contas de laboratórios)


## Utilização de aplicativos complementares

### Complemento Inicializador rápido

Você pode executar diretamente vários aplicativos complementares clicando nos ícones dos aplicativos instalados no Inicializador rápido. Você pode alterar a ordem dos ícones dos aplicativos arrastando-os.

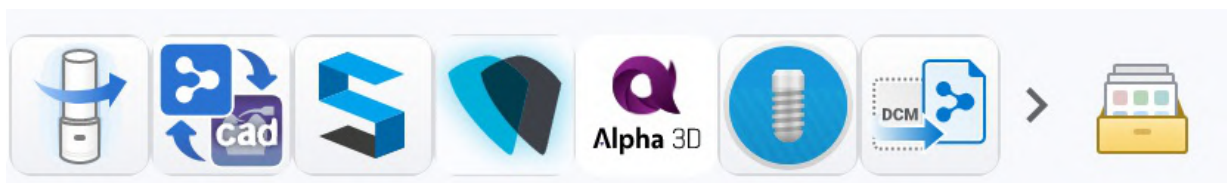

### Gerenciamento do inicializador de aplicativos

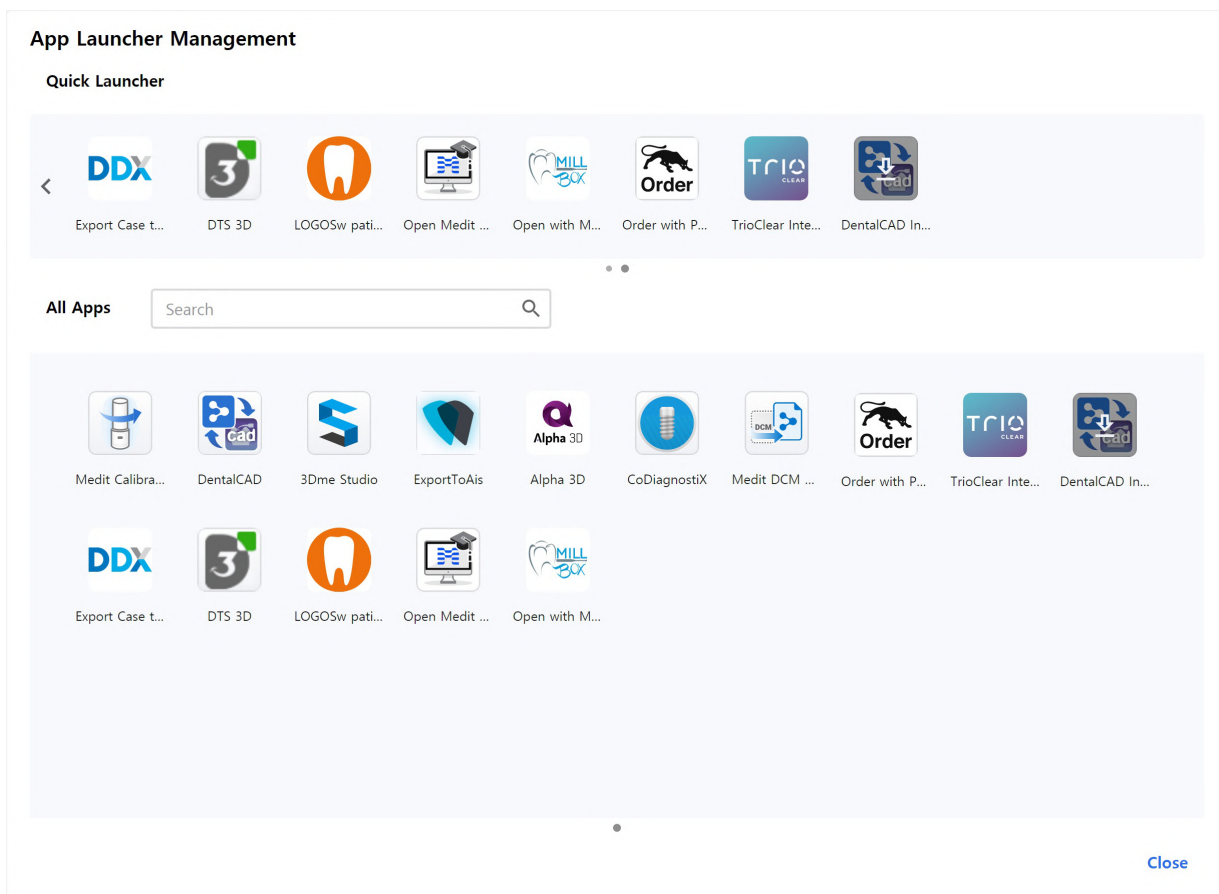

## Inicializador rápido

Você pode definir quais aplicativos aparecem no Inicializador rápido. Você pode alterar a ordem dos ícones dos aplicativos arrastando-os ou pode criar pastas para agrupar aplicativos semelhantes e organizá-los.

## Todos os apps

São mostrados todos os aplicativos que você instalou. Você pode clicar com o botão direito no ícone de um aplicativo para adicioná-lo ao Inicializador rápido. Ao clicar com o botão direito no menu de contexto, você também pode selecionar se deseja executar, instalar ou desinstalar o aplicativo.

# Obter arquivos de resultados

## Exportar arquivos de resultados de escaneamento

Além de compartilhar resultados com parceiros por meio de pedidos, o Medit Link permite que você armazene seus arquivos de resultados no formato de arquivo desejado usando a função de exportação.

**Export Files in This Case**

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

[Preview](#)

Close


Export

119

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exportar arquivos para              | Especifique o caminho onde deseja armazenar os arquivos de resultados.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nome da pasta                       | O sistema cria uma nova pasta e armazena todos os arquivos de resultados nela. O nome da pasta padrão é definido pela regra de nomenclatura. Mas é possível alterar o nome da pasta diretamente. Você pode definir a regra de nomenclatura em Configurações > Opções de exportação > Regras para o nome da pasta. |
| Nome do arquivo                     | Define o nome do arquivo para o resultado. A regra de nomenclatura define o nome de arquivo padrão. Mas é possível alterar o nome do arquivo diretamente. Você pode definir a regra de nomenclatura em Configurações > Opções de exportação > Regras para o nome do arquivo.                                      |
| Tipo                                | Escolha o programa de design que deseja usar. O Medit Link ajustará automaticamente os arquivos de acordo com sua seleção, permitindo prosseguir com o design sem a necessidade de alinhamento adicional de eixo.                                                                                                 |
| Formato da malha                    | Especifica o formato do arquivo de malha.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formato da imagem                   | Especifique o formato dos arquivos de imagem exportados.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comprimir arquivos                  | Comprime todos os resultados em um único arquivo.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Combinar malha individual           | Combina o resultado de maxila ou mandíbula com o dente individual. Isso é útil quando não é possível importar vários arquivos para um programa.                                                                                                                                                                   |
| Exportar todas as relações oclusais | Quando vários resultados oclusais são gerados no aplicativo de escaneamento, você pode exportar todos esses resultados de uma só vez.                                                                                                                                                                             |
| Salvar informações do caso como PDF | Salva as informações sobre o caso como PDF com o resultado.                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Exportar arquivos de resultados da lista de casos

É possível exportar arquivos de resultados de um caso ou de vários casos simultaneamente com a opção "Exportar" acima da lista de casos na Case Box e na Work Box.

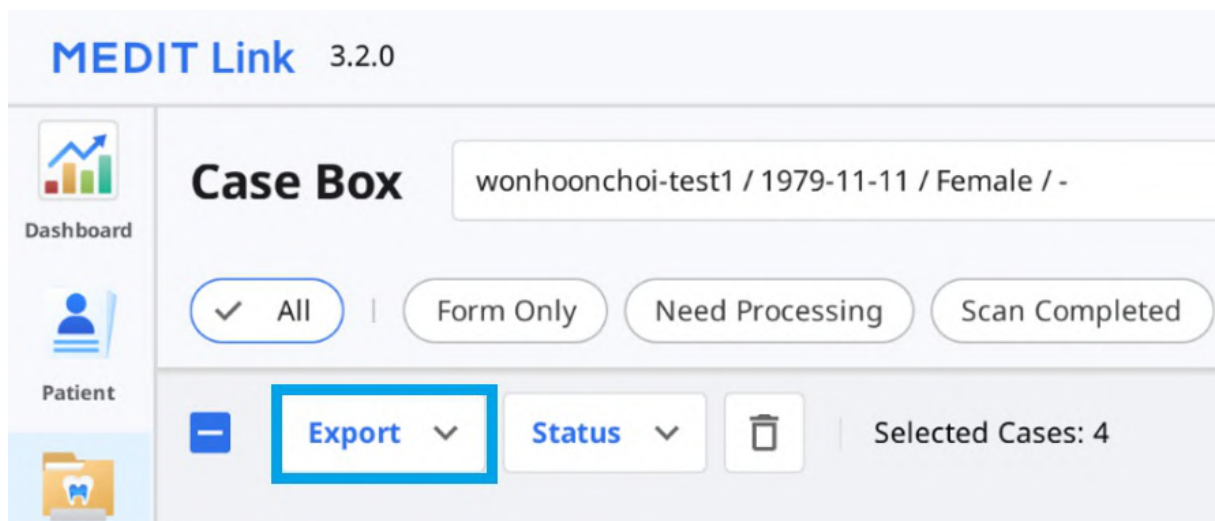

1. Acesse Case Box ou Work Box.
2. Selecione na lista todos os casos dos quais deseja exportar arquivos de resultados.

**MEDIT Link** 3.2.0

**Case Box** wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All | 
 ☐ Form Only | 
 ☐ Need Processing | 
 ☐ Scan Completed | 
 ☐ CAD | 
 ☐ Ordered | 
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ | 
 **Status** ▾ | 
 | 
 Selected Cases: 4

|                                     | Status         | Patient Name      | Case Name                | Form Information |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Scan Completed | wonhoonchoi-test1 | wonhoonchoi-test1's Case | -                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Form Only      | wonhoonchoi-test1 | wonhoonchoi-test1's Case | -                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Form Only      | wonhoonchoi       | originalcase             | -                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Scan Completed | wonhoonchoi-test1 | wonhoonchoi-test1's Case | -                |

3. Clique em "Exportar" e selecione "Arquivos de resultados".

**Export** ▾

**Result Files**

**Case List (as shown)**

**Case List (with all items)**

4. Defina a pasta de destino, o tipo de arquivo, o formato da malha e o formato da imagem e selecione as opções de exportação na guia "Opções".

### Export Files in Selected Cases

#### Options

**Export Files To**

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

**Folder Name**

Case Creation Date - Case Name

**File Name**

Case Creation Date - Case Name

**Type** ⓘ

Medit

**Mesh Format**

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☒ PLY
 ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

**Image Format**

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
 ☐ JPEG
 ☒ PNG
 ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

#### Observação

Os campos "Nome da pasta" e "Nome do arquivo" não são editáveis ao exportar arquivos para vários casos.

O nome da pasta e o nome do arquivo são criados automaticamente de acordo com as regras que você definiu para as opções "Regra para nome das pastas" e "Regra para nome dos arquivos" em Configurações > Opções de exportação.

- Clique em "Exportar".
- Clique em "Sim" para abrir a pasta na qual os arquivos serão salvos.

### Question




Exporting successfully completed.  
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

## Exportar arquivos de resultados do Visualizador de arquivos

Você pode exportar arquivos de resultados de escaneamento para um caso com o ícone "Exportar" no canto superior direito da guia Visualizador de arquivos.

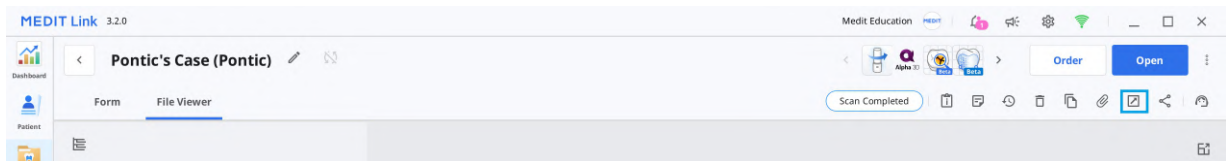

1. Acesse Case Box ou Work Box.
2. Clique em um caso da lista para abri-lo.
3. Clique no ícone "Exportar" no canto superior direito da guia Visualizador de arquivos.

4. Defina a pasta de destino, o nome da pasta, o nome do arquivo, o tipo de arquivo, o formato da malha e o formato da imagem e selecione as opções de exportação na guia "Opções".

**Export files in case**

**Options**   **File List**

Export Files To  
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name  
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name  
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type  
Maestro


Mesh Format  
Convert mesh files to the below formats  
☐ meditMesh   ☐ OBJ   ☒ PLY   ☐ STL  
☒ Do not convert the attached files

Image Format  
☐ Convert images to the below format  
☐ JPG   ☐ JPEG   ☒ PNG   ☐ BMP

☐ Compress Files  
☐ Combine Individual Mesh  
☐ Export All Occlusal Relationship  
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


[Close](#)   [Export](#)

5. Na guia "Lista de arquivos", você pode selecionar os arquivos necessários para o caso desmarcando os desnecessários.

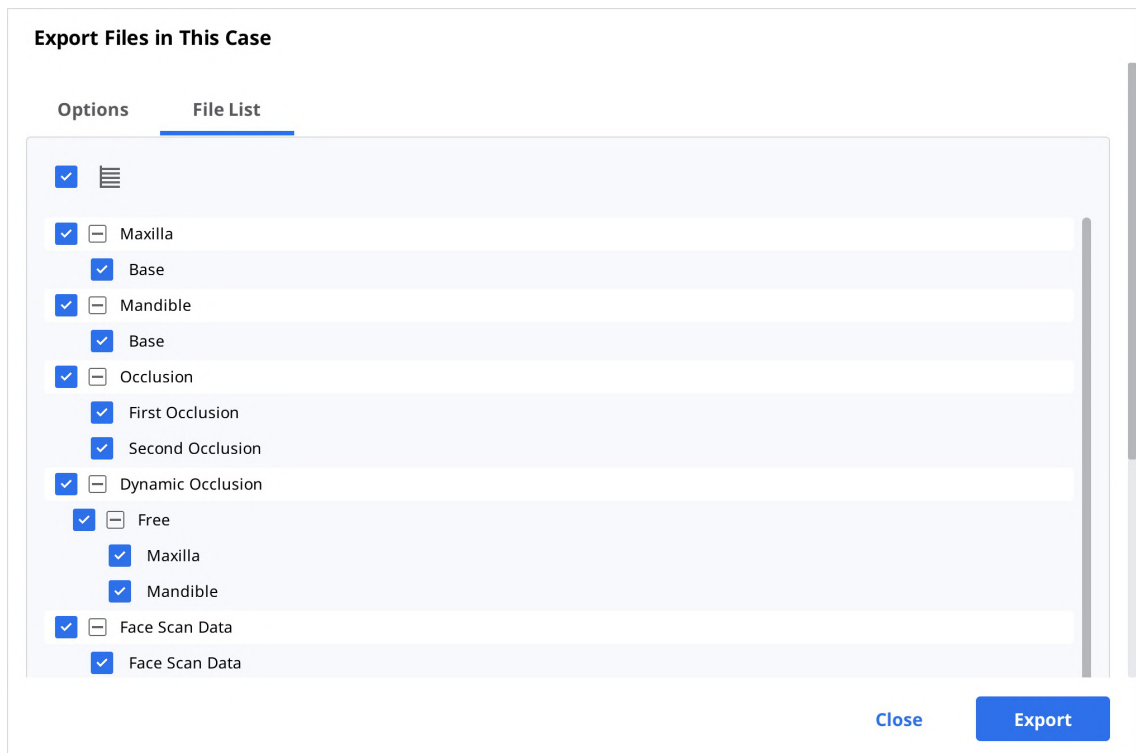


6. Clique em "Exportar".

7. Clique em "Sim" para abrir a pasta na qual os arquivos serão salvos.

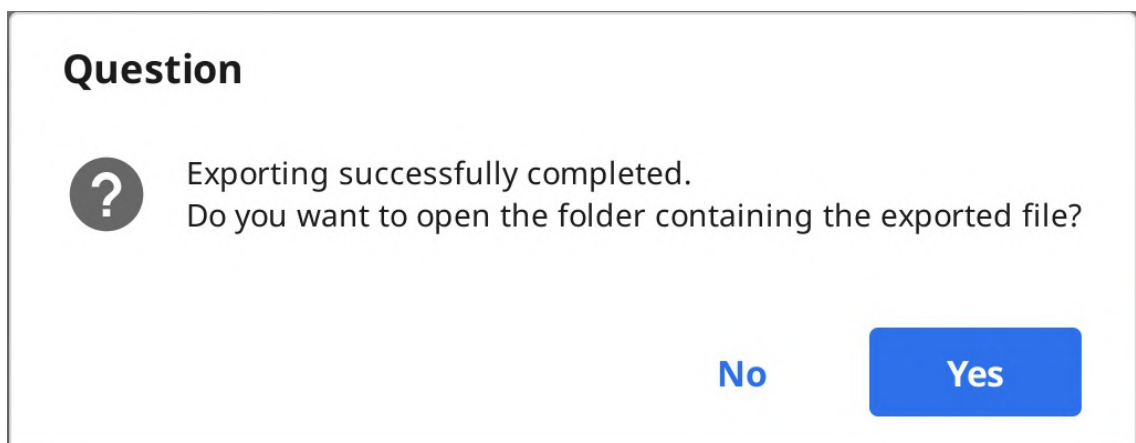

## Exportar arquivos de resultados da árvore de dados


Você pode exportar um ou mais arquivos em um grupo de dados específico no menu expandido do Visualizador de arquivos.

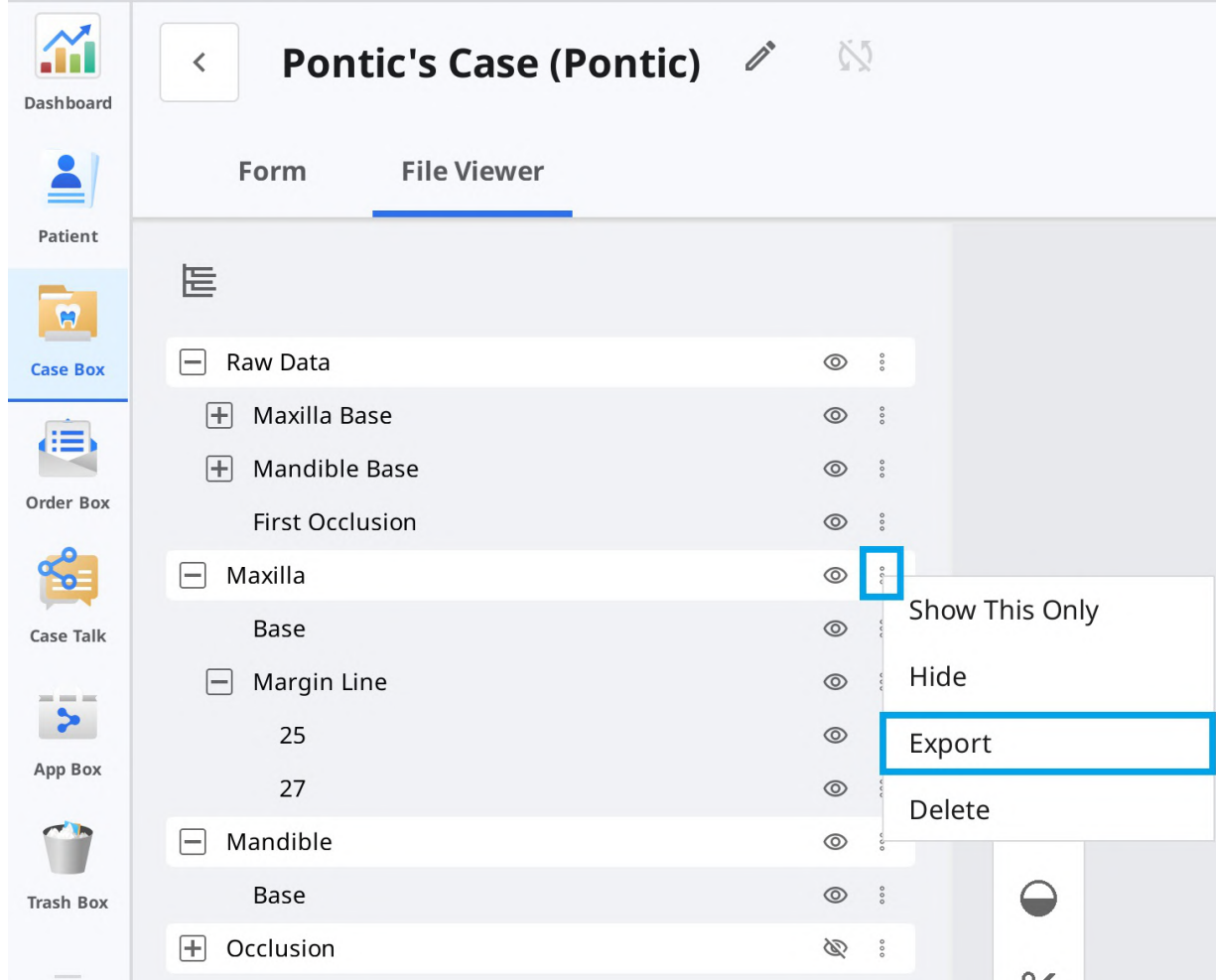

1. Acesse Case Box ou Work Box.
2. Clique em um caso da lista para abri-lo.
3. Clique no ícone de três pontos ao lado do grupo de dados ou de uma entidade na árvore de dados da guia Visualizador de arquivos.



4. Depois, clique em "Exportar".

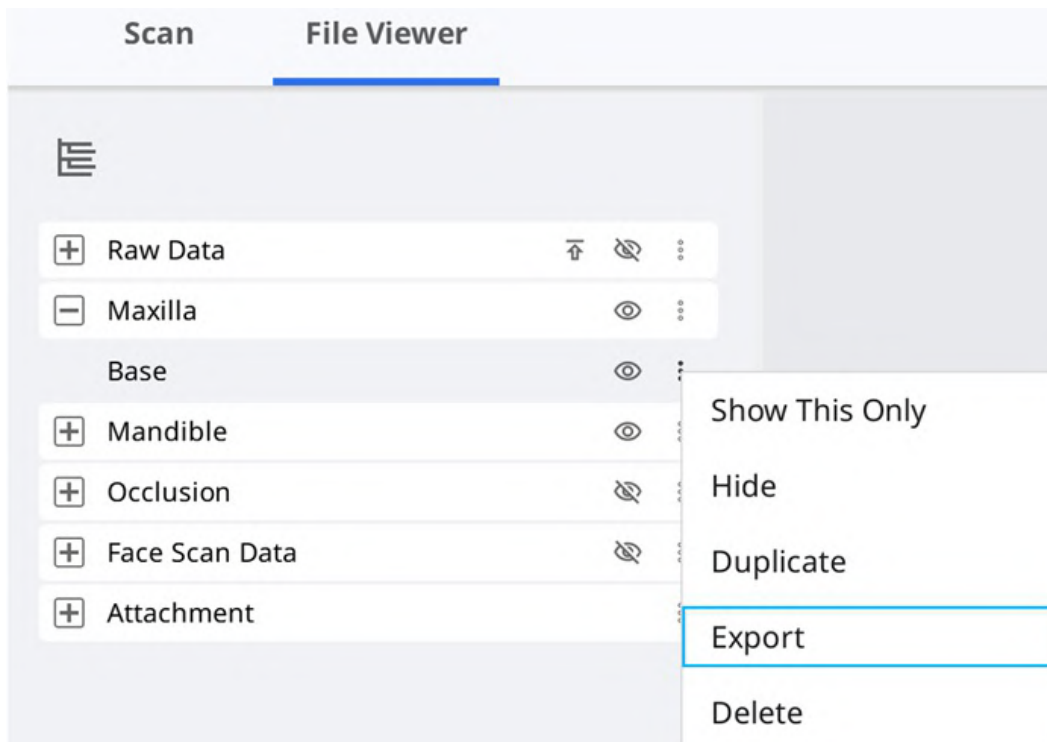

5. Defina a pasta de destino, o nome da pasta, o nome do arquivo, o tipo de arquivo, o formato da malha e o formato da imagem e selecione as opções de exportação na guia "Opções".

### Export files in case

Options
File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format


☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP


☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close
Export

6. Você pode ver que apenas os arquivos escolhidos na árvore de dados estão selecionados na Lista de arquivos.

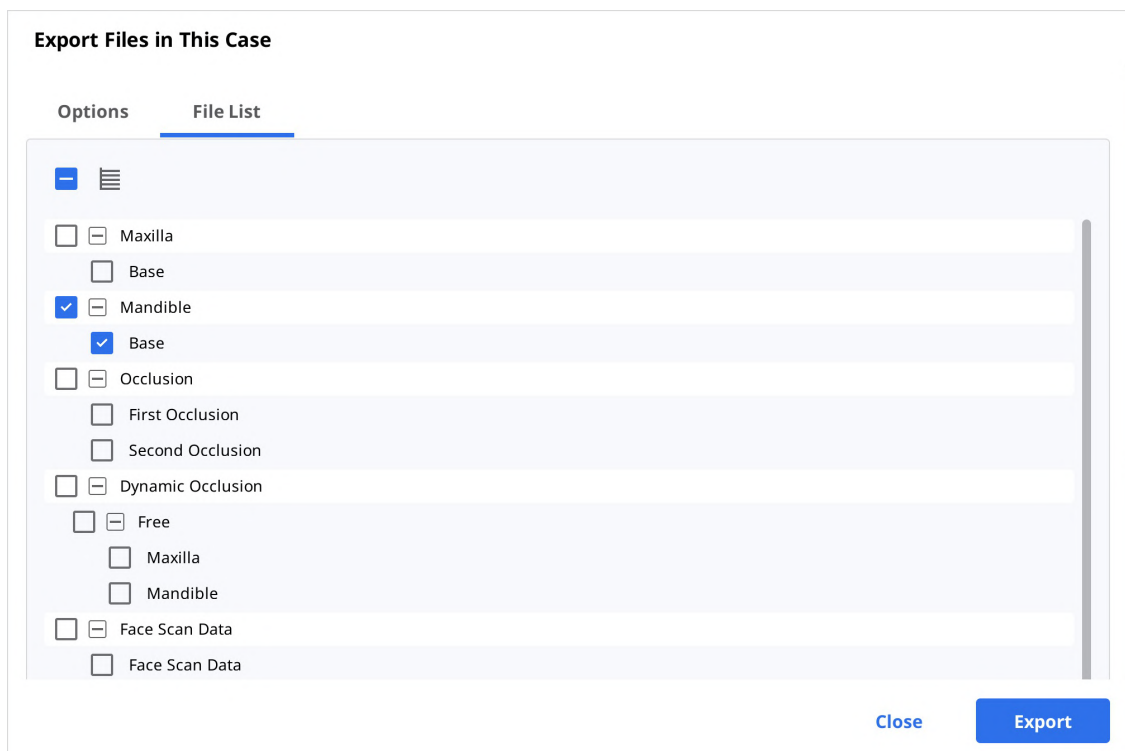

7. Clique em "Exportar".
8. Clique em "Sim" para abrir a pasta na qual os arquivos serão salvos.

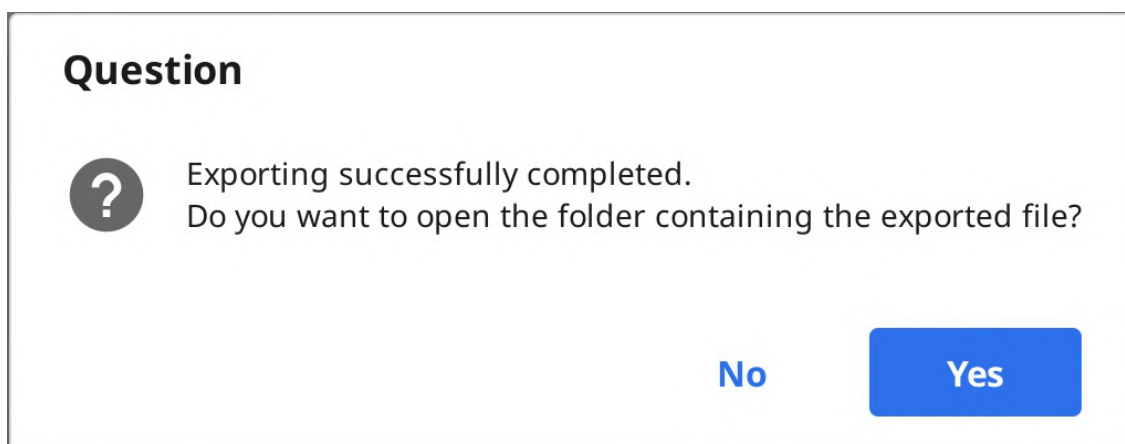

## Exportar a lista de casos como CSV

O Medit Link fornece a função para exportar a lista de casos para o formato CSV.


Você pode exportar a lista de casos com informações básicas e gerenciar casos facilmente.

1. Acesse Case Box, Order Box, In Box ou Work Box.
2. Selecione os casos que deseja exportar.

The screenshot shows the MEDIT Link 3.2.0 interface. At the top, there's a 'Case Box' header with a patient selection dropdown (wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -) and a '+2' button. Below this are filter tabs: All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, and Case Completed. A sidebar on the left contains icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, and App Box. The main area displays a table of cases with columns: Status, Patient Name, Case Name, Form Information, Last Modified Date, Scan Date, Lab Name, and Order Date. Four cases are listed, all with 'Scan Completed' status.

| Status         | Patient Name      | Case Name                | Form Information | Last Modified Date  | Scan Date          | Lab Name | Order Date |
|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------|------------|
| Scan Completed | wonhoonchoi-test1 | wonhoonchoi-test1's Case | -                | 2023-10-19 오전 11:00 |                    |          |            |
| Form Only      | wonhoonchoi-test1 | wonhoonchoi-test1's Case | -                | 2023-10-05 오전 8:15  |                    |          |            |
| Form Only      | wonhoonchoi       | originalcase             | -                | 2023-10-05 오전 8:10  |                    |          |            |
| Scan Completed | wonhoonchoi-test1 | wonhoonchoi-test1's Case | -                | 2023-10-05 오전 8:10  | 2023-08-18 오전 9:00 |          |            |

3. Clique em "Exportar" e selecione "Lista de casos (conforme exibidos)" ou "Lista de casos (com todos os itens)".

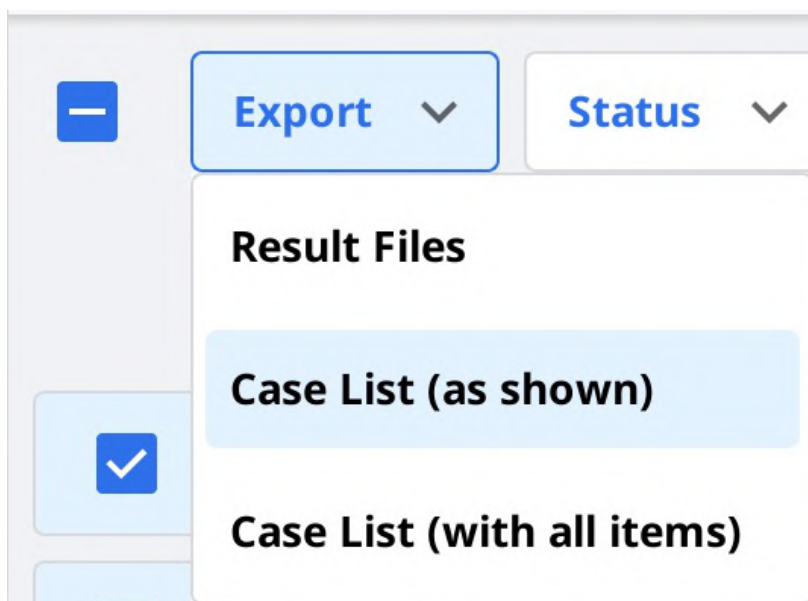

#### 🔍 Observação

Lista de casos (conforme exibidos): exporte a lista de casos com os itens exibidos atualmente na tela. Acesse Opções de visualização > Itens da tabela para mostrar ou ocultar os itens conforme desejado. Lista de casos (com todos os itens): exporte a lista de casos com todos os itens, incluindo Estado, Nome do caso, Data de nascimento, Informações do formulário, Modificado em, Data de escaneamento, Data do pedido e Nome do laboratório.

4. Defina o caminho e o nome do arquivo e, então, salve a lista.
5. A lista de casos é salva como arquivo CSV.

## Exportar a linha de margem


O Medit Scan for Clinics fornece uma função para criar a linha de margem, e o Medit Link pode transferir a linha de margem para o programa CAD.

## Exportar a linha de margem como uma cor

Em geral, o Medit Link converte a linha de margem em cor e exporta o resultado com maxila ou mandíbula juntas. Você pode criar a linha de margem em seu CAD fazendo referência às informações de cores.

Exemplo:

## Maxila

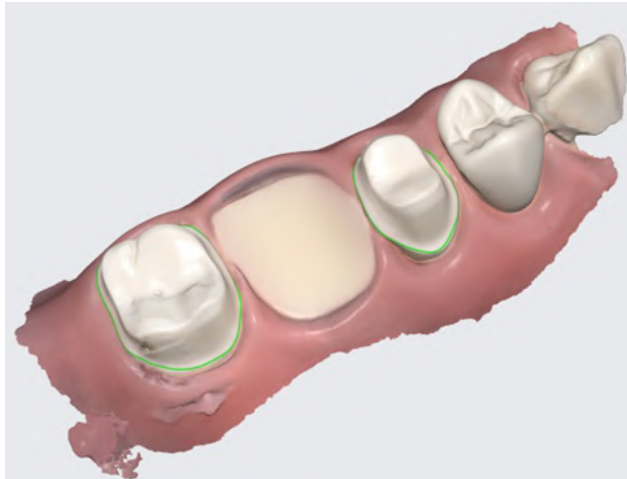

Resultado com as linhas de margem como informações em cores

### 🔍 Observação

Essa funcionalidade está disponível para formatos que incluem informações de cores, como meditMesh, OBJ e PLY. A linha de margem não é convertida em STL.

### 🔍 Observação



Tipo > 3Shape não oferece suporte a essa funcionalidade.

## Exportar a linha de margem como um arquivo

No caso do exocad, o Medit Link exporta a linha de margem para "~margin.xyz" que pode ser importado diretamente para o exocad.

Você pode usar esse arquivo no exocad sem trabalho adicional.

Exemplo:
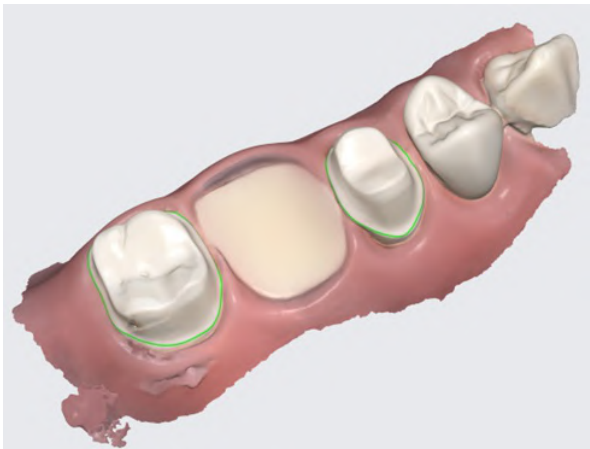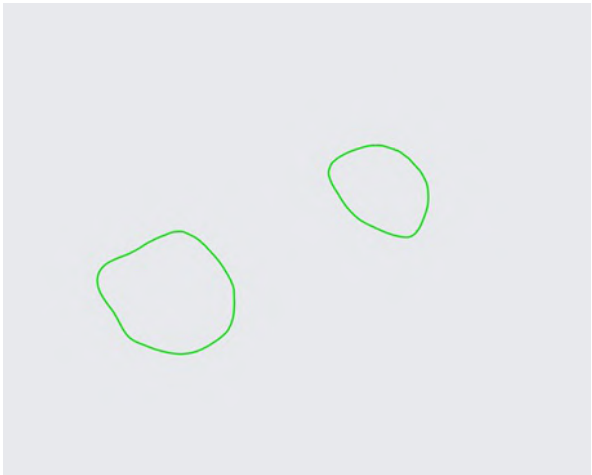
| Maxila                                                                                                                                                 | Linha de margem                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Resultado com as linhas de margem como informações em cores</p> |  <p>Linha de margem exportada como arquivos individuais</p> |

## Download de arquivos do Medit Link Web

O Medit Link fornece uma função de download.

Se você deseja obter os arquivos de resultados sem instalar o aplicativo Medit Link, pode baixá-los do serviço da web Medit Link.

### Observação


Os dados devem ser transferidos por upload no Medit Cloud para fazer o download dos arquivos da web.

A função de download está disponível no menu a seguir do serviço da web Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

## Case Box/Work Box

Você encontra o botão "Download" no canto superior direito.

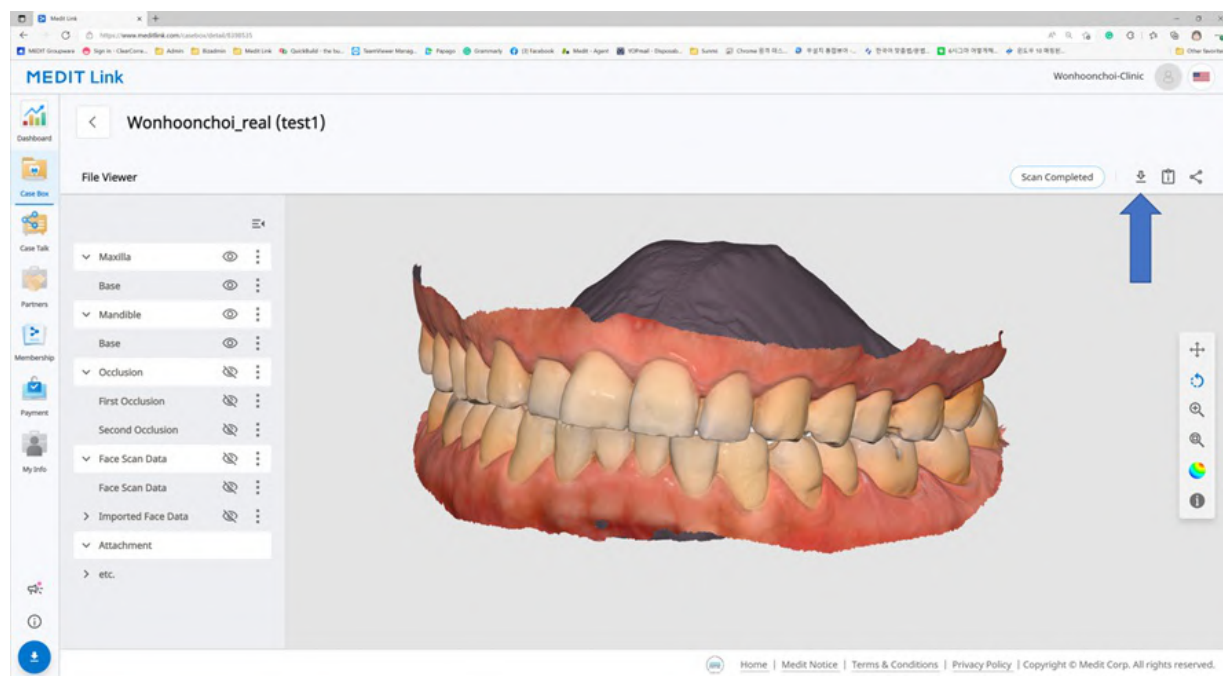

## Web Viewer

Ao compartilhar o caso usando o Case Talk, você pode definir se deseja permitir o download ou não.

Se você marcar “Conceder permissão de download” e compartilhar o caso, todos os usuários que se conectarem pelo link compartilhado poderão fazer o download dos arquivos.

**Share through Case Talk**

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment


Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

No Web Viewer, você encontra o ícone "Download" no canto superior direito.

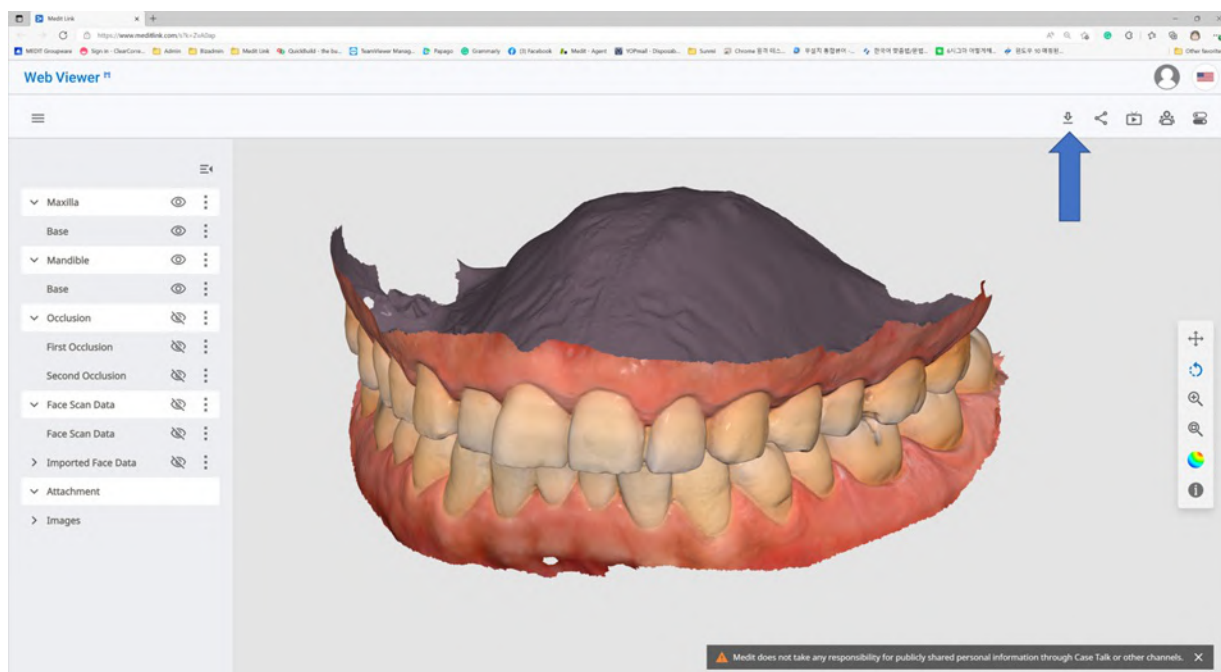

1. Clique em "Download".



2. Selecione o formato de malha na caixa de diálogo de download.

**Download** Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.  
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

**i** The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

**i** The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

3. Depois, clique em "OK".

## Pedir/gerenciar pedidos

Você pode fazer facilmente o pedido de um caso com dados adquiridos de programas conectados e anexados pelo usuário.

### Pedidos de casos

Você pode fazer um pedido para seus parceiros na Case Box.

1. Clique no botão "Pedido".
2. Verifique as informações necessárias para o seu pedido.

**Order**

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi\_Lab\_Stage

**WonhoonChoi\_Lab\_Stage**

Seoul, KR  
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea  
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. Selecione um parceiro.
4. Verifique as informações do produto na guia Lista de pedidos.
  - Você pode decidir se deseja compartilhar o nome do paciente.
5. Verifique os arquivos a serem pedidos na guia Lista de arquivos.
6. Insira a data de entrega desejada.
  - O valor padrão é definido como 7 dias após a data do pedido.
7. Você pode adicionar notas e etiquetas para o seu parceiro a fim de descrever detalhes específicos.
8. Quando vários resultados oclusais são gerados no aplicativo de escaneamento, você pode enviar todos

esses resultados de uma só vez marcando "Pedir todas as relações oclusais".

9. Continue com o seu pedido.

## Confirmar pedido (In Box)

- Aceite o pedido ao recebê-lo.
- Os pedidos aceitos serão encaminhados à Work Box.

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic', and two buttons: 'Reject' and 'Confirm Order'. The 'Confirm Order' button is highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', and a 'Pending' status indicator.

## Cancelar pedido (Order Box)

- É possível cancelar um pedido antes que o seu parceiro o aceite.
- Casos cancelados podem ser pedidos novamente.

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case (test)', and two buttons: 'Cancel' and 'Confirm Order'. The 'Cancel' button is highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', and a 'Pending' status indicator.

## Rejeitar pedido (In Box)

- Você pode rejeitar um pedido recebido.
- Casos rejeitados podem ser pedidos novamente.

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic', and two buttons: 'Reject' and 'Confirm Order'. The 'Reject' button is highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', and a 'Pending' status indicator.

## Verificação de casos pedidos

Você pode verificar os detalhes do caso que pediu na Order Box da conta da clínica. Você também pode verificar o caso que recebeu na In Box da conta de laboratório.

The screenshot shows the MEDIT Link 3.2.0 interface. The header bar includes the 'MEDIT Link 3.2.0' logo, the user name 'Wonhoon Choi', and various system icons. The main content area is titled 'test's Case - Clone / wh-clinic-ds...'. It features a sidebar with navigation icons for Dashboard, In Box, Work Box, Case Talk, App Box, and Trash Box. The main area has tabs for 'Order' and 'File Viewer'. The 'Order' tab is active, showing a form with fields for Order ID (13455074), Patient Name (\*\*\*), Partner Name (wh-clinic-dso-3), Scanned Date (2023-08-04 08:15:58), Order Date (2023-10-26 04:38), Requested Delivery Date (2023-11-02 08:00), and Expected Delivery Date (2023-11-02 08:00). There is also a 'Memo' field and a 'Tags' section. On the right side, there is a table titled 'Order List' with columns for No., Type, Method, Material, and Shade. The table contains four rows of data, all with 'Inlay' as the Type and 'Multi-Layered Zirconia' as the Material. The 'Accepted' button is highlighted with a red box.

| No. | Type  | Method | Material               | Shade      |
|-----|-------|--------|------------------------|------------|
| 3   | Inlay | -      | Multi-Layered Zirconia | None Shade |
| 4   | Inlay | -      | Multi-Layered Zirconia | None Shade |
| 5   | Inlay | -      | Multi-Layered Zirconia | None Shade |
| 6   | Inlay | -      | Multi-Layered Zirconia | None Shade |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações de encomenda</b> | As informações que podem ser incluídas no pedido são as seguintes: ID do pedido/nome do paciente/nome da conta/data de escaneamento/data do pedido/data de entrega/data de vencimento da entrega/nota.<br>Você pode verificar os detalhes do produto solicitado e as informações de entrega. |
| <b>Lista de pedidos</b>         | A lista de pedidos exibe os detalhes do produto pedido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Envio</b>                    | Insira/verifique as informações de remessa.                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Inserir informações de envio (In Box)

Insira as informações de envio do caso concluído e inicie o envio.

1. Clique na guia Envio.
2. Insira as informações de envio e clique em "Registrar".

### Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.  
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

---

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. As informações inseridas são enviadas ao seu parceiro.

## Gerenciamento da data de entrega

Você pode definir a data esperada de entrega ao fazer um pedido, e essa informação será encaminhada ao seu parceiro.

## Configuração da data de entrega solicitada (conta de clínica)

- Ao fazer pedidos na Case Box, você pode inserir a data de entrega solicitada.

**Order**

General   **Order List**   File List

Partner  
WonhoonChoi\_Lab\_Stage

 **WonhoonChoi\_Lab\_Stage**  
Seoul, KR  
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea  
01026088546

Case Name  
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name  
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date  
2023-04-13

Delivery Time  
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags  
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order  
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- O valor padrão é 7 dias após a data do pedido.
- Insira a data/hora em que deseja receber os produtos e prossiga com o pedido.
- Você pode definir a hora facilmente usando a barra deslizante.

## Configuração da data de entrega estimada (conta de laboratório)

- Você pode inserir a data de entrega esperada para o caso pedido a partir da In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order List Shipment

Order ID  
10413603

Patient Name  
test

Partner Name  
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date  
2022-09-29 오전 7:56

Order Date  
2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date  
2022-10-01 오전 10:30

Expected Delivery Date  
2022-10-01 오전 10:30

Memo  
<Scanbody Library>  
16 : ODENTIS\_Custom\_(NMR) ver 1.41 - Custom\_Mini\_Extra Long\_16mm - N-HEX\_T10  
15 : ODENTIS\_Custom\_(NMR) ver 1.41 - Custom\_Mini\_Extra Long\_16mm - N-HEX\_T10  
14 : ODENTIS\_Custom\_(NMR) ver 1.41 - Custom\_Mini\_Extra Long\_16mm - N-HEX\_T10

| No. | Type          | Method            | Material               | Shade      | Price |
|-----|---------------|-------------------|------------------------|------------|-------|
| 16  | Implant Crown | Cementation Ty... | Multi-Layered Zirconia | None Sh... | 0     |
| 15  | Implant Crown | Cementation Ty... | Multi-Layered Zirconia | None Sh... | 0     |
| 14  | Implant Crown | Cementation Ty... | Multi-Layered Zirconia | None Sh... | 0     |

Total KRW 0


1. Verifique a data de entrega solicitada com o parceiro e a remarque usando o botão "Editar".



2. Insira a data de entrega estimada levando em conta o dia útil real. Se necessário, você também pode deixar

um comentário.

3. Clique em "Aplicar".

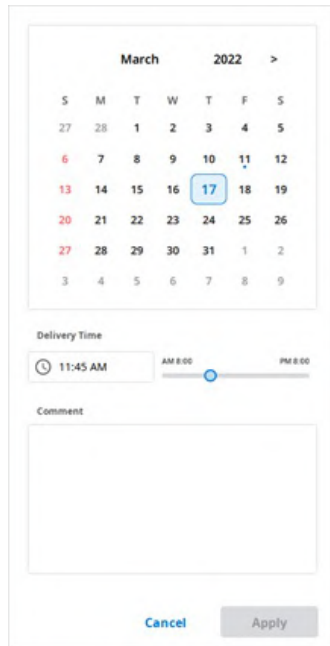

March 2022 >

| S  | M  | T  | W  | T  | F  | S  |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 27 | 28 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |

Delivery Time

11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. A data de entrega estimada e a nota serão encaminhadas juntamente com o pedido.
  - Você pode verificar a data e as notas na Order Box.
  - Você pode alterar a data de entrega esperada, e as alterações serão encaminhadas ao seu parceiro.
5. É possível verificar o histórico do caso usando o botão "Histórico".



## Concluir caso

### Concluir (Work Box/In Box)


Depois que todas as tarefas estiverem concluídas, clique em "Concluído" para concluir o caso.

### Concluir um caso nos detalhes dele

O ícone de três pontos fica à direita do botão "Abrir" ou "Escanear novamente".




Conclua o trabalho clicando no ícone e selecionando "Done".

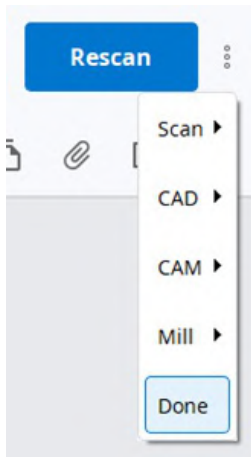

## Concluir vários casos na lista de casos

1. Acesse a Work Box.
2. Selecione todos os casos a concluir.

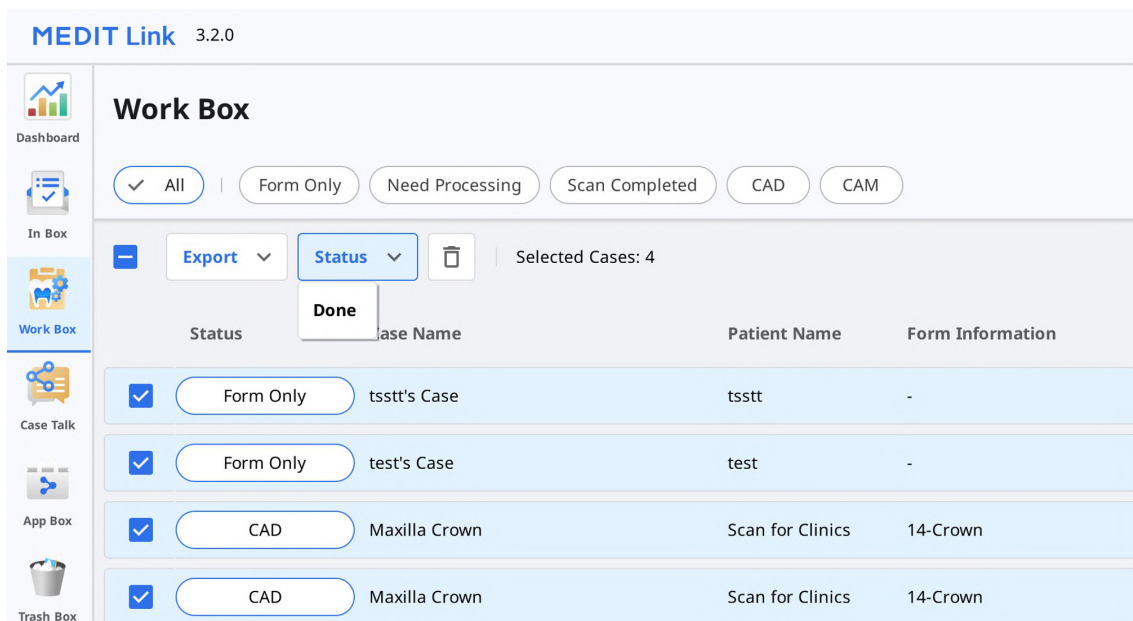


3. Clique em "Estado" e selecione "Done".

## Concluir (Case Box/Order Box)

Após a conclusão do caso no laboratório, a clínica precisa confirmar o caso para concluir todo o processo do pedido.

A clínica poderá encontrar o botão "Confirmar entrega" na Order Box se o laboratório concluir seu trabalho.

Clique nela para que todo o processo do pedido seja concluído e o estado do caso, alterado para "Case Completed".

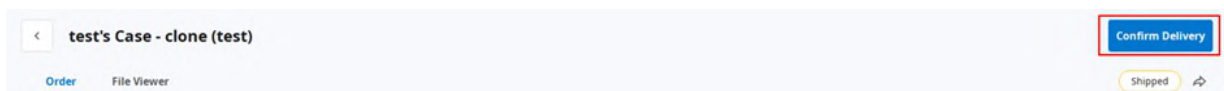

## Concluir um caso sem pedido na Case Box

Para casos que não são pedidos ao laboratório, você pode concluí-los a partir da Case Box.

1. Acesse a Case Box.
2. Selecione o caso que deseja concluir.

**Case Box** Patient

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | Ordered | Cas

Export Status Selected Cases: 4

**Case Completed**

|                                     | Status         | Case Name                                  |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Ordered        | test test's Case                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Scan Completed | wonhoonchoi-test1 wonhoonchoi-test1's Case |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Scan Completed | test test(1234) G11598492310180503424      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Scan Completed | test test's Case                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Scan Completed | test test's Case                           |

3. Clique em "Estado" e selecione "Case Completed".

## Comunicar usando etiquetas

Você pode incluir informações adicionais para o seu caso usando etiquetas e enviá-las aos seus parceiros.

### Adicionar etiquetas ao criar um caso

Você pode inserir etiquetas ao criar um caso ou editar informações do caso.

**New Case Information**

Patient Name\*

Case Name\*

i

Creating patient information involves consent from the patient.  
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

É fácil pesquisar e selecionar etiquetas que você usou antes.

**New Case Information**

Patient Name\*

Case Name\*

**i** Creating patient information involves consent from the patient.  
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

## Adicionar etiquetas ao fazer pedido

Você pode verificar e editar etiquetas na caixa de diálogo Pedido ao fazer pedidos.

**Order**

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi\_Lab\_Stage

**WonhoonChoi\_Lab\_Stage**  
Seoul, KR  
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea  
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

AM 8:00 오전 8:15 PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

**i** You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

## Verificar etiquetas em detalhes do caso

