

USER GUIDE

Medit Link (Revision 10) 2025.03.18

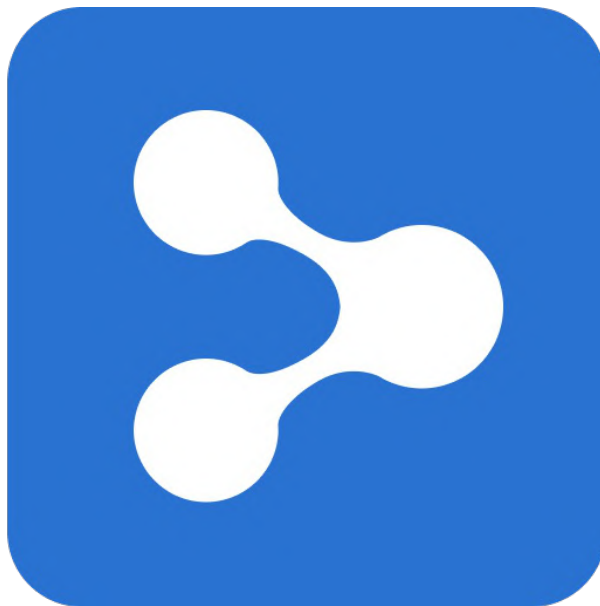


Table of Contents

Medit Link

Вступ	7
Medit Link	7
Огляд	7
Хмарний сервіс	8
Платформа керування робочим процесом із системою оформлення замовлень	9

Medit Link > Installation

Системні вимоги	10
Системні вимоги для Windows	10
Системні вимоги для macOS	10
Системні вимоги для вебсервісу	10
Рекомендовані браузерери	10
Мінімальні системні вимоги для мобільних пристроїв	10
Встановлення на Windows	11
Встановлення на macOS	14

Medit Link > Getting Started

Реєстрація та вхід до системи	18
Вебсайт Medit Link	18
Реєстрація	18
Вхід і вітальна сторінка	21

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	24
Огляд Dashboard	24
Medit Insights	24
Підписка на Medit Insights	25
Скасування підписки на Medit Insights	26
Patient	27
Пошук пацієнта	27
Case Box/Work Box	28
Фільтрування проєктів	28
Фільтрування за пацієнтом	28
Фільтрування за статусом	31
Фільтрування за періодом	31
Фільтрування за пошуком	32
Деталі проєкту	32
Order Box/In Box	34
Деталі замовлення	34
Вкладки в Order Box/In Box	34
Case Talk	35
Створення Case Talk	35
Встановлення типу дозволу та параметрів спільного доступу	36
Деталі Case Talk	38
Web Viewer	39
Анотація	40
Коментарі	42

Надання доступу до екрана в реальному часі	42
Дерево даних	42
Елементи керування деревом даних	42
Елементи керування 3D-моделлю	43
Partners	45
Пошук партнерів	45
Перелік моїх партнерів	45
Запрошення партнера	46
Membership	47
Тарифний план	47
Medit Cloud Storage Plan	47
Хмарне сховище	49
Підписка	49
Скасувати підписку	51
Моя підписка	52
Деталі	53
Повторна підписка	53
Як додати метод оплати	54
Як змінити метод оплати	55
Застосувати	56
Деталі	56
Реєстрація промокоду	57
Активація промокоду	57
Деталі оплати	58
Перегляд деталей оплати	58
My Info	60
Мій обліковий запис	60
Моя клініка/Моя лабораторія (лише для облікового запису адміністратора)	60
Мій сканер	61
Інші елементи меню	63
Сповіщення й оновлення	63
Пов'язані вебсайти	63
Завантаження застосунку Medit Link	64
 Medit Link > Medit Link App	
Огляд	65
У наведеній нижче таблиці показано, які розділи меню доступні для кожного типу облікового запису клініки та лабораторії.	65
Рядок заголовка	66
Моя інформація	66
Сповіщення	66
Сповіщення й оновлення	67
Параметри	67
Статус мережі	68
Параметри	70
Загальні	70
Керування сховищем	71
Задати період	72
Локальне сховище	72
Хмарне сховище	72
Налаштувати під'єднані програми	73
Опції експорту	73

Інструмент конвертації проєктів	75
Експорт проєкту	76
Імпорт проєкту	77
Параметри проксі-сервера	79
Інформація	79
Посібник користувача	80
Меню	81
Dashboard	81
Patient	81
Додавання нового пацієнта	82
Видалення пацієнта	82
Об'єднання пацієнтів	83
Case Box/Work Box	83
Вкладки в Case Box/Work Box	84
Функції в Case Box/Work Box	84
Order Box/In Box	85
Вкладки в Order Box/In Box	86
Case Talk	86
App Box	87
Усі	87
Medit Apps	88
Завантажені	88
Trash Box	88
Диспетчер синхронізації проєктів	89
Передавання	89
Завантаження	90
Пов'язані вебсайти	90
Переглядач файлів	92
Дерево даних	92
Інструменти керування моделлю	92
Елементи керування 3D-моделлю	93
Керування 2D-зображенням	94
Функціональні інструменти	94
Захоплення зображення й примітка	94
Ортодонтичне захоплення	95
Заповнити пусті місця	96
Обрізання	97
Оптимізувати зіставлення оклюзії	100
Рух нижньої щелепи	102
Керування даними множинної оклюзії в переглядачі файлів	102
Як керувати множинними результатами	102
Опції перегляду	104
Фільтри статусу	104
Тип перегляду	105
Групування	105
Сортування	105
Фільтрування та пошук	107
Фільтрування за пацієнтом	107
Фільтрування за датою	108
Розширені можливості пошуку	109

Створення/редагування/клонування/видалення проєктів	111
Створення проєктів	111
Створення проєкту в Case Box (клініка)	111
Створення проєкту в Work Box (лабораторія)	112
Редагування проєктів	112
Редагування проєкту в Case Box (клініка)	112
Редагування проєкту в Work Box (лабораторія)	113
Клонування проєктів	114
Клонування проєкту в Case Box (клініка)	114
Клонування проєкту в Work Box (лабораторія)	114
Видалення проєктів	115
Видалення проєкту (клініка та лабораторія)	115
Інформація форми	116
Реєстрація інформації форми в Case Box	116
Введення на вкладці «Форма»	116
Реєстрація інформації форми в Work Box	116
Введення на вкладці «Форма»	116
З'єднання зубів у міст	116
Налаштування параметрів сканування	117
Medit Scan for Labs	117
Загальні параметри	117
Параметри для зубів	117
Додавання до вибраного	117
Як додати до вибраного	118
Керування вибраними шаблонами	118
Сканування/робота з CAD	119
Сканування	119
Робота з CAD	119
Використання додаткових застосунків	119
Панель швидкого запуску	119
Керування запуском застосунків	119
Панель швидкого запуску	120
Усі застосунки	120
Отримання файлів результатів	121
Експорт файлів результатів сканування	121
Експорт файлів результатів із переліку проєктів	122
Експорт файлів результатів із переглядача файлів	125
Експорт файлів результатів із дерева даних	126
Експорт переліку проєктів у форматі CSV	129
Експорт лінії краю	130
Експорт лінії краю як кольору	130
Експорт лінії краю як файлу	131
Завантаження файлів із вебсервісу Medit Link	131
Case Box/Work Box	132
Web Viewer	132
Замовлення/керування замовленнями	135
Замовлення проєктів	135
Підтвердження замовлення (In Box)	136
Скасування замовлення (Order Box)	136
Відхилення замовлення (In Box)	136
Перегляд замовлених проєктів	136
Введення інформації про доставлення (In Box)	137

Керування датою доставлення	137
Вказування запитаної дати доставлення (обліковий запис клініки)	137
Вказування очікуваної дати доставлення (обліковий запис лабораторії)	138
Завершення проєкту	139
Завершення проєкту (Work Box/In Box)	139
Завершення проєкту за допомогою значка «Деталі проєкту»	139
Завершення декількох проєктів із переліку проєктів	140
Завершення проєкту (Case Box/Order Box)	140
Завершення проєкту, який не було замовлено, в Case Box	140
Комунікація за допомогою тегів	142
Додання тегів під час створення нового проєкту	142
Додавання тегів під час оформлення замовлення	143
Перегляд тегів в деталях проєкту	143

Вступ

Medit Link

Medit Link – це інструмент для спільної роботи, який полегшує взаємодію між клініками та лабораторіями з метою оптимізації робочого процесу в кожній зі сторін.

Функції, які надаються в програмі, залежать від типу та дозволів облікового запису. Програма має зручний користувацький інтерфейс для керування робочим процесом: від сканування за допомогою внутрішньоротових і лабораторних сканерів до оформлення замовлень та проєктування й виробництва протезів.

Medit Link складається з вебсервісу та комп'ютерного застосунку.

Огляд

		Вебсервіс	Застосунок
		• Реєстрація облікових записів і керування ними • Пошук партнерів і керування ними • Надання доступу до проєктів через Web Viewer за допомогою посилання • Доступ до проєктів, створених у застосунку • Керування замовленнями	• Введення інформації форми • Сканування • Керування замовленнями • Зв'язок із CAD-програмами • Керування пацієнтами
Клініка	Адміністратор	Пошук партнерів та керування ними, керування клініками та надання доступу до проєктів • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Введення інформації форми, сканування, розміщення замовлень та керування пацієнтами • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Користувач	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Лабораторія	Адміністратор	Пошук партнерів та керування ними, керування лабораторією, а також надання доступу до проєктів • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Введення інформації форми, сканування, розміщення замовлень • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Користувач	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Хмарний сервіс

Medit Link підтримує автоматичне передавання/завантаження баз даних і файлів через AWS (Amazon Web Services).

Дані, що зберігаються в хмарі, автоматично синхронізуються з комп'ютерами користувачів організації, завдяки чому вони можуть отримувати доступ до тих самих даних у будь-який час і з будь-якого комп'ютера. Хмарне резервне копіювання та можливість відновлення убезпечують усі дані. Навіть якщо дані втрачено внаслідок раптового збою комп'ютера, їх можна відновити з даних, які збережено в хмарі.

Хмарний сервіс дозволяє стоматологічним клінікам та лабораторіям, які є партнерами, швидко обмінюватися даними без необхідності пересилати дані сканування електронною або звичайною поштою. Всі дані, включно з інформацією про пацієнтів, надійно шифруються, зберігаються та передаються. Компанія Medit дотримується медичних законів та регламентів, таких як HIPAA та GDPR.

Платформа керування робочим процесом із системою оформлення замовлень

Medit Link пропонує власну систему оформлення замовлень.

- Medit Link дозволяє стоматологічним клінікам і лабораторіям встановлювати партнерські відносини, а також швидко й легко обмінюватися даними.
- Ви можете перевіряти статус замовлення та керувати ним.

Системні вимоги

Примітка

Якщо ви хочете використовувати програмне забезпечення для сканування зі своїм сканером, ознайомтесь із системними вимогами Medit Scan for Clinics і Medit Scan for Labs.

Системні вимоги для Windows

	Ноутбук і настільний комп'ютер
Процесор	Intel Core i5 2.6 GHz або вище
Оперативна пам'ять	Мінімум 16 GB
Відеокарта	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) або вище / або еквівалентна відеокарта AMD
ОС	Windows 10 64-розрядна (недоступно для 32-розрядної) або вище

Системні вимоги для macOS

	Mac
Процесор	M1 з 8-ядерним процесором, 7-ядерним графічним процесором, 16-ядерною системою Neural Engine
Оперативна пам'ять	Мінімум 16 GB
ОС	Monterey 12 або вище

Системні вимоги для вебсервісу

Рекомендовані браузери

	Браузери
ПК	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Мінімальні системні вимоги для мобільних пристроїв

	Android	iOS
Пристрій	Еквівалент Galaxy S7 або вище	Еквівалент iPhone 7 або вище
ОС	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
Оперативна пам'ять	Мінімум 3 GB	Мінімум 2 GB
Процесор застосунків	Above Snapdragon 710	A10 Fusion


Встановлення на Windows

Medit Link встановлюється в комплекті з програмами сканування Medit Scan for Clinics і Medit Scan for Labs.


1. Запустіть файл Medit_LinkSetup.exe.
2. Виберіть мову для встановлення.
3. Виберіть папку для встановлення Medit Link. Прочитайте умови ліцензії, погодьтеся з ними та натисніть «ВСТАНОВИТИ».

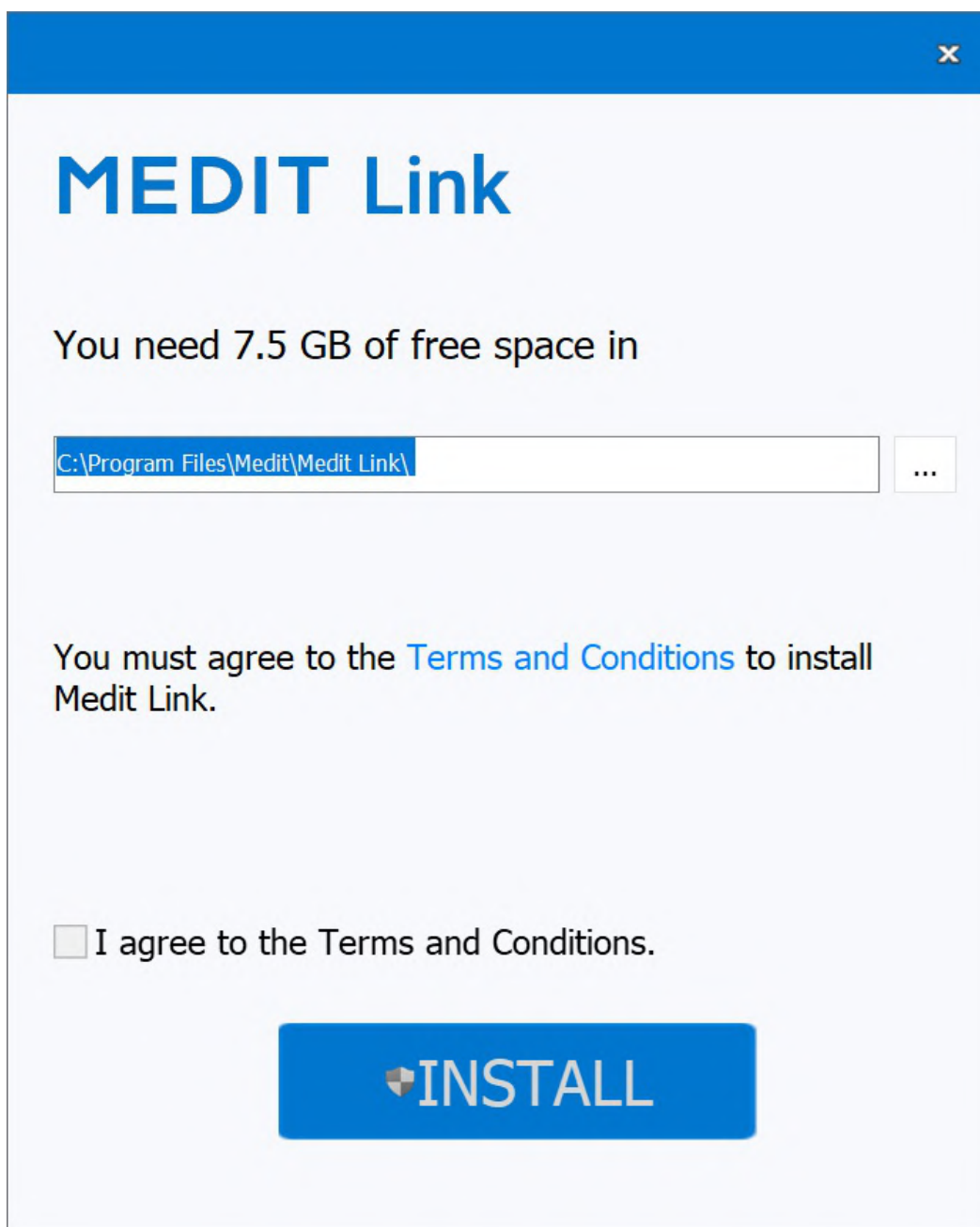

4. Перш ніж переходити до наступного кроку, переконайтеся що кабель сканера від'єднаний від комп'ютера. Встановлення не буде продовжене, якщо сканер під'єднаний до ПК.
5. Програма буде встановлена автоматично, і це може зайняти кілька хвилин. Не вимикайте та не від'єднуйте ПК від електромережі до завершення встановлення.

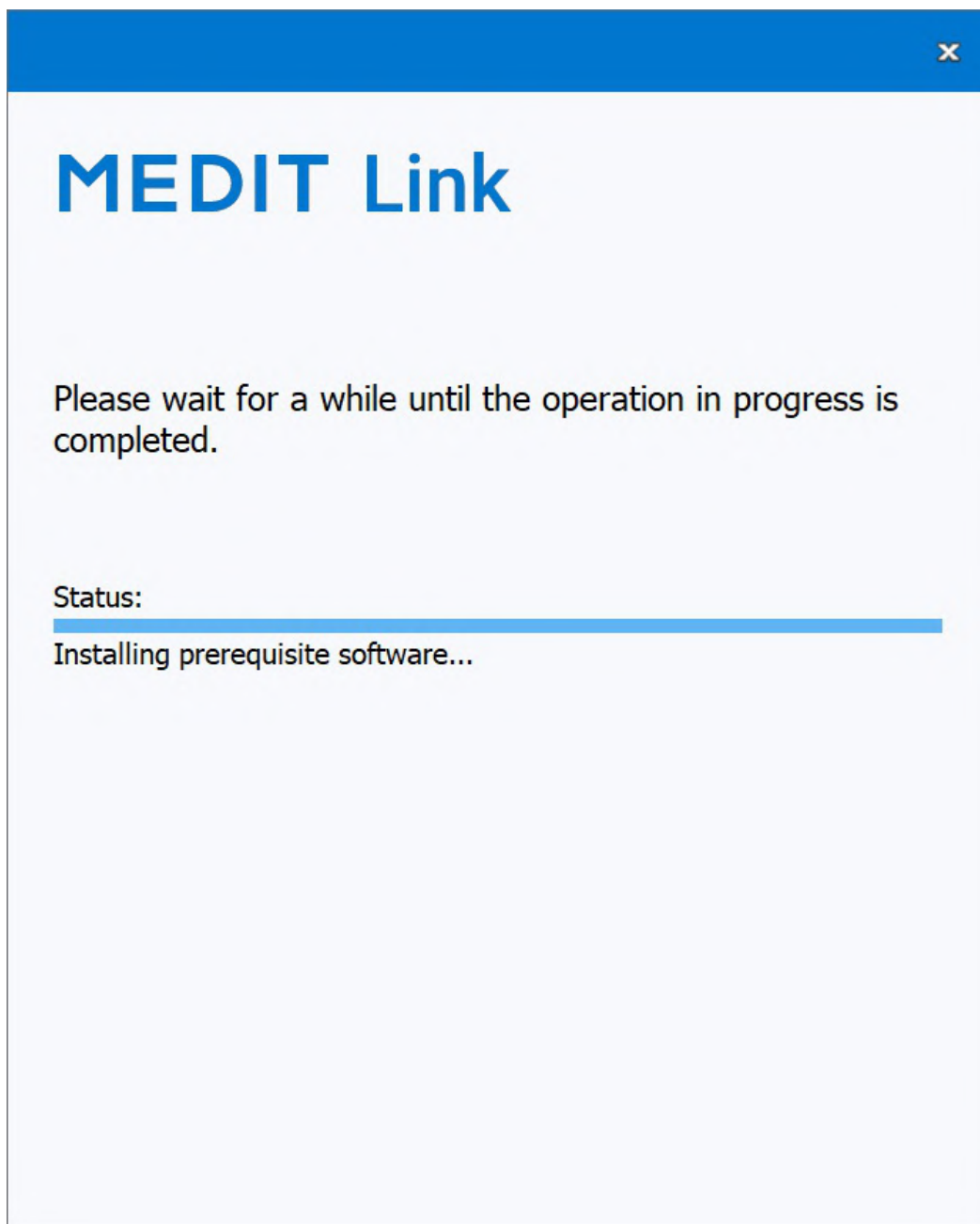

6. Після завершення встановлення перезавантажте ПК. Якщо у вас немає сканера, можна продовжити роботу без перезавантаження ПК.

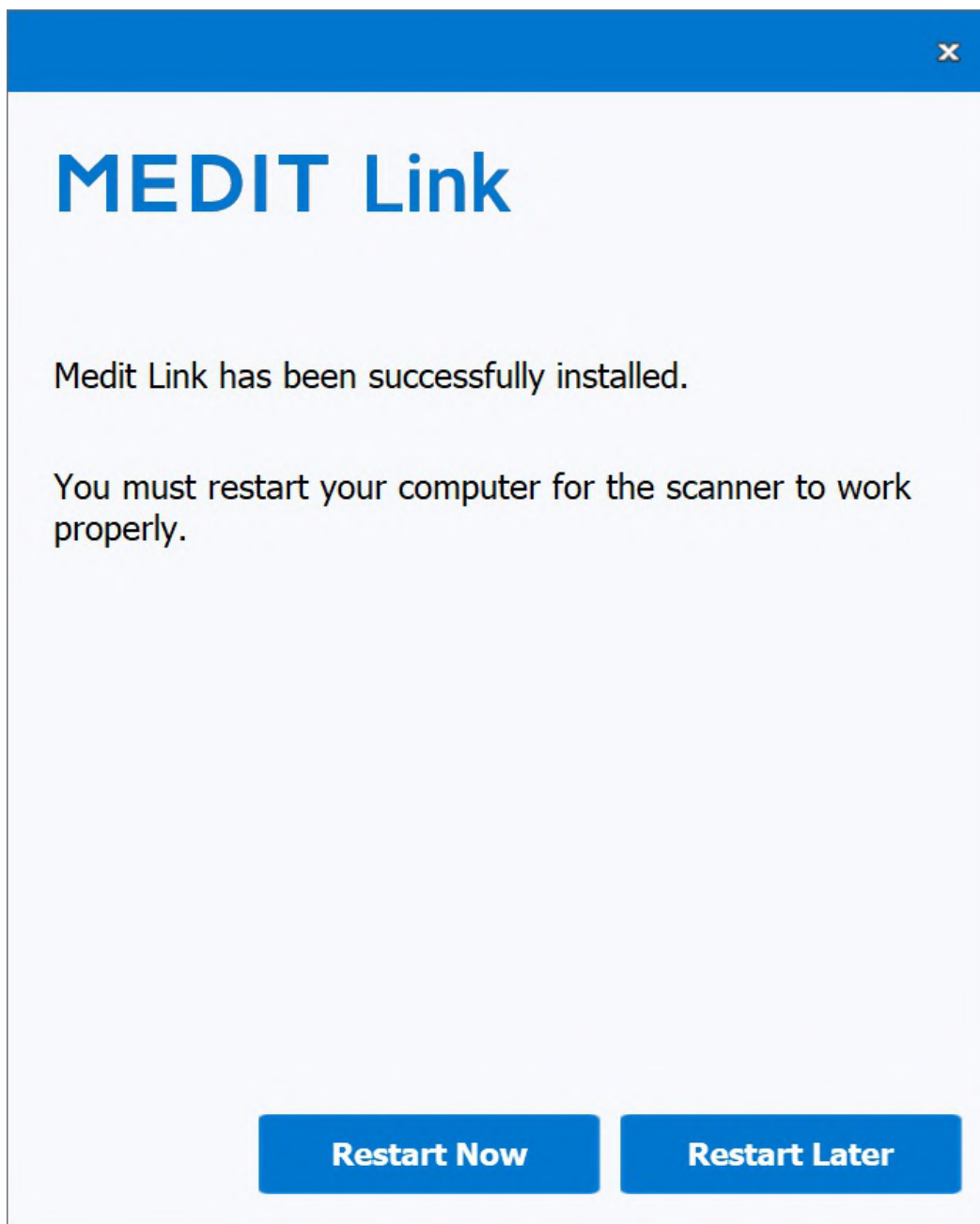


 Примітка

Якщо ви не перезавантажите ПК після встановлення, сканер може не працювати належним чином.


Встановлення на macOS

Medit Link встановлюється в комплекті з Medit Scan for Clinics.


1. Запустіть файл Medit_Link_x.x.x.pkg і натисніть «Продовжити».

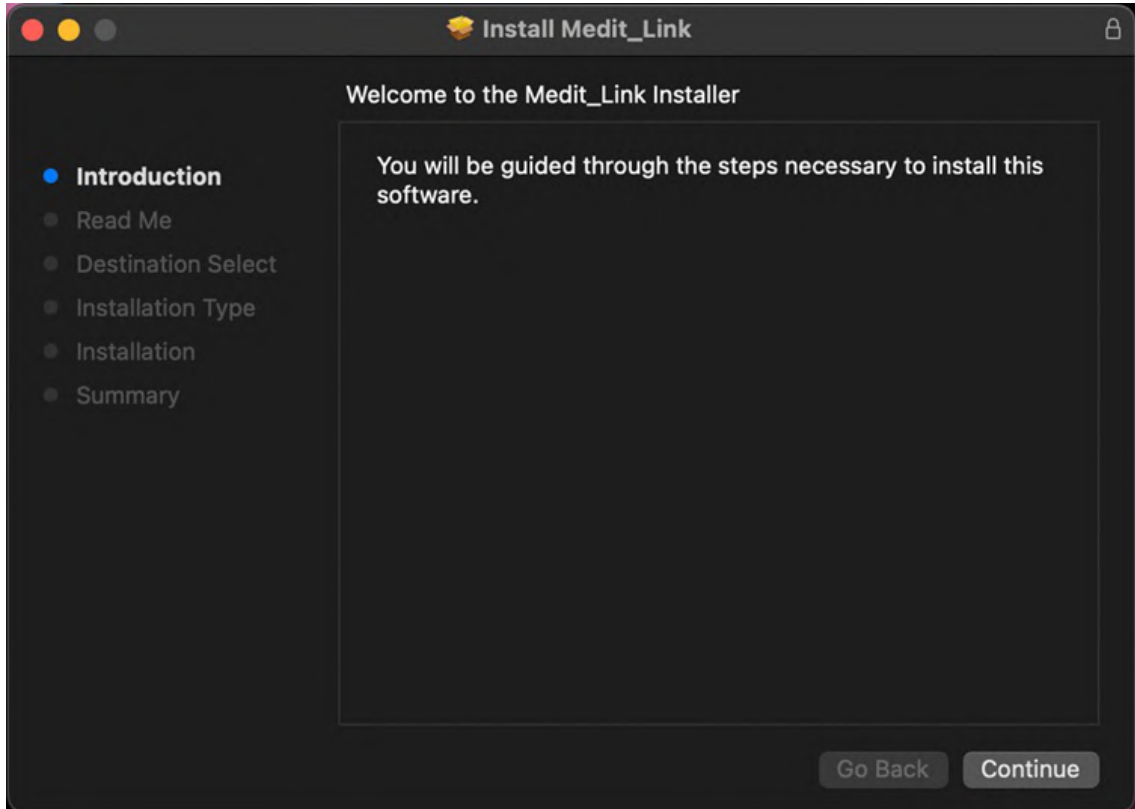


2. Прочитайте Ліцензійну угоду з кінцевим користувачем і натисніть «Продовжити».

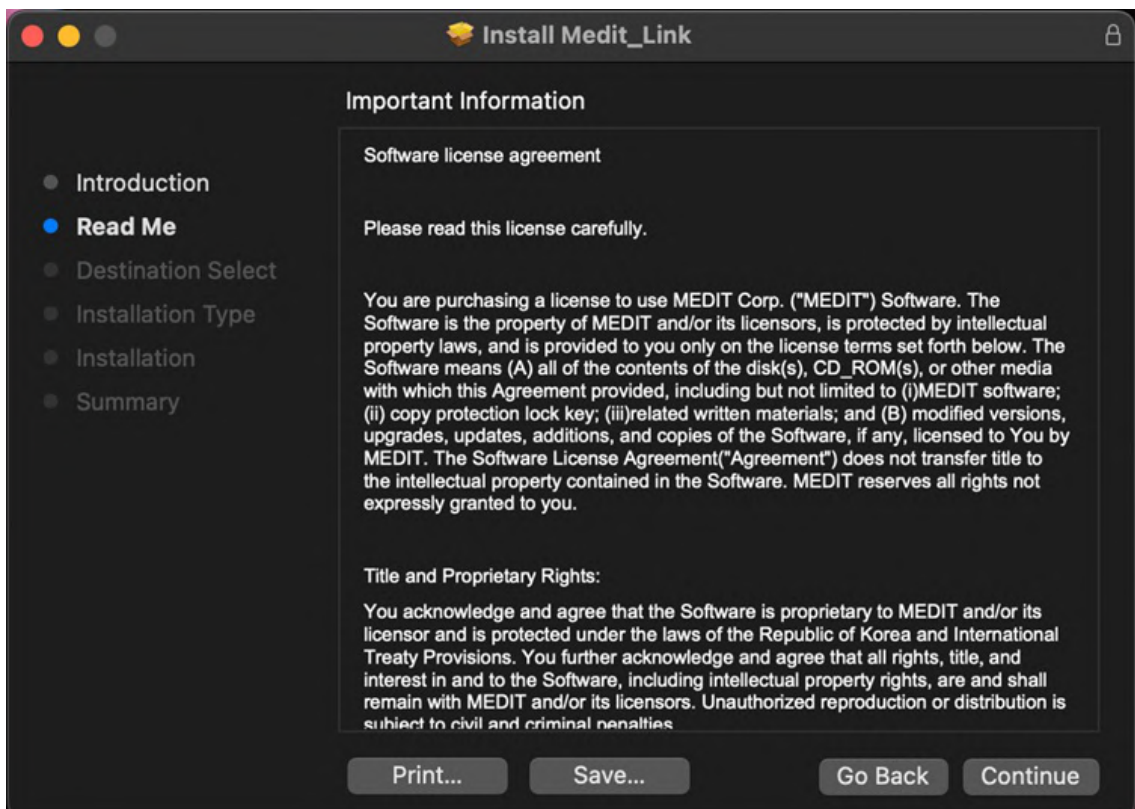

3. Виберіть диск для встановлення та натисніть «Продовжити».

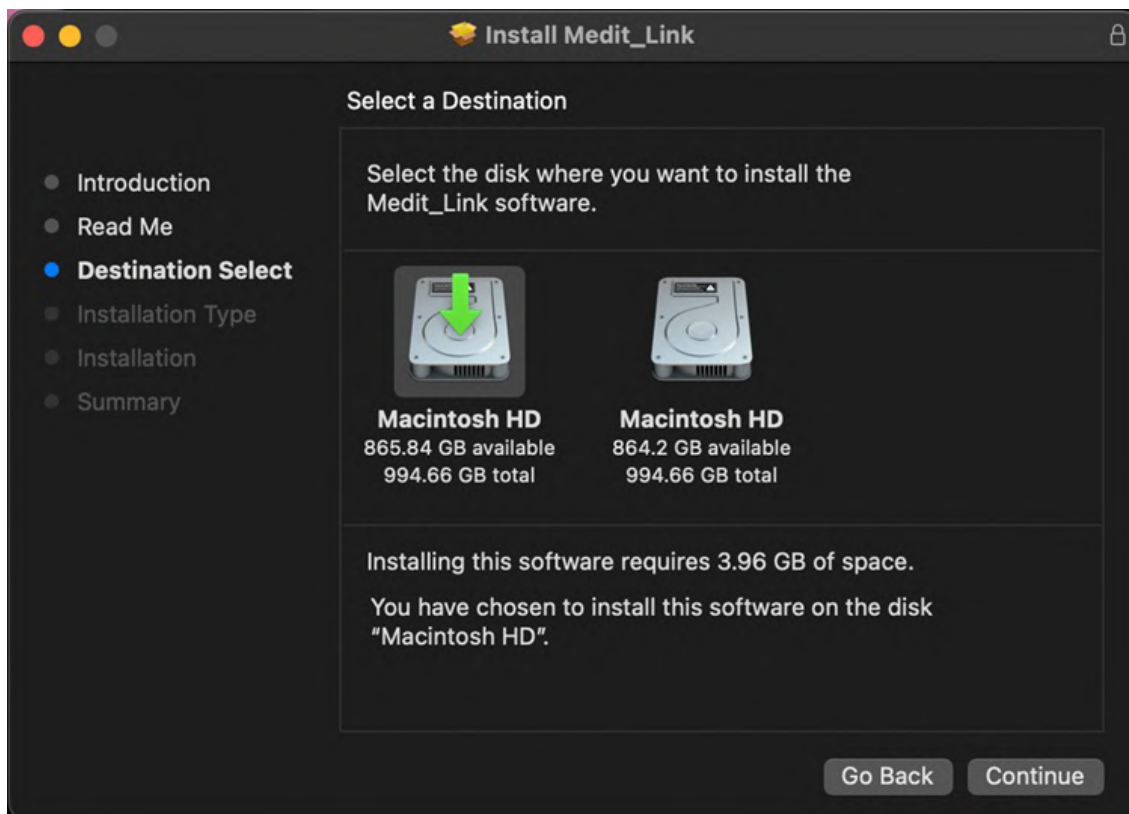


4. Щоб змінити місце встановлення, натисніть «Змінити місце встановлення».

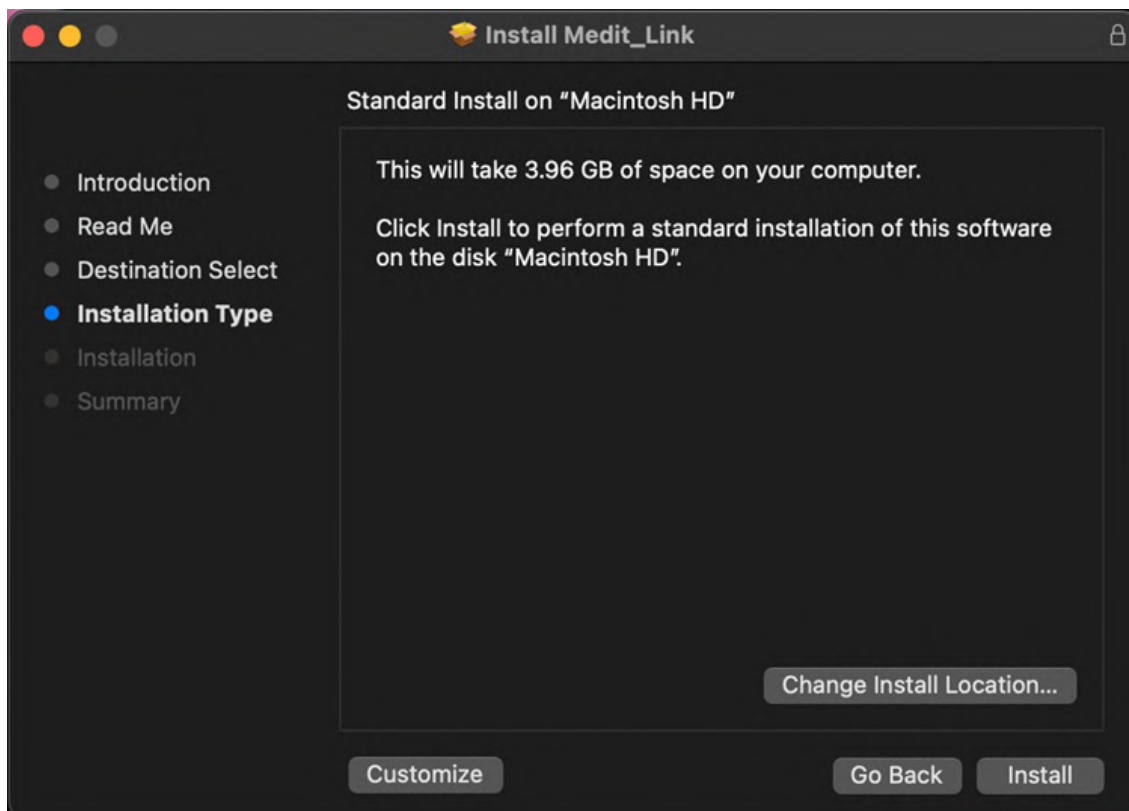


5. Натисніть «Встановити» та введіть свій пароль від Мас, якщо його буде запитано, щоб дозволити встановлення.



6. Дочекайтеся завершення встановлення.

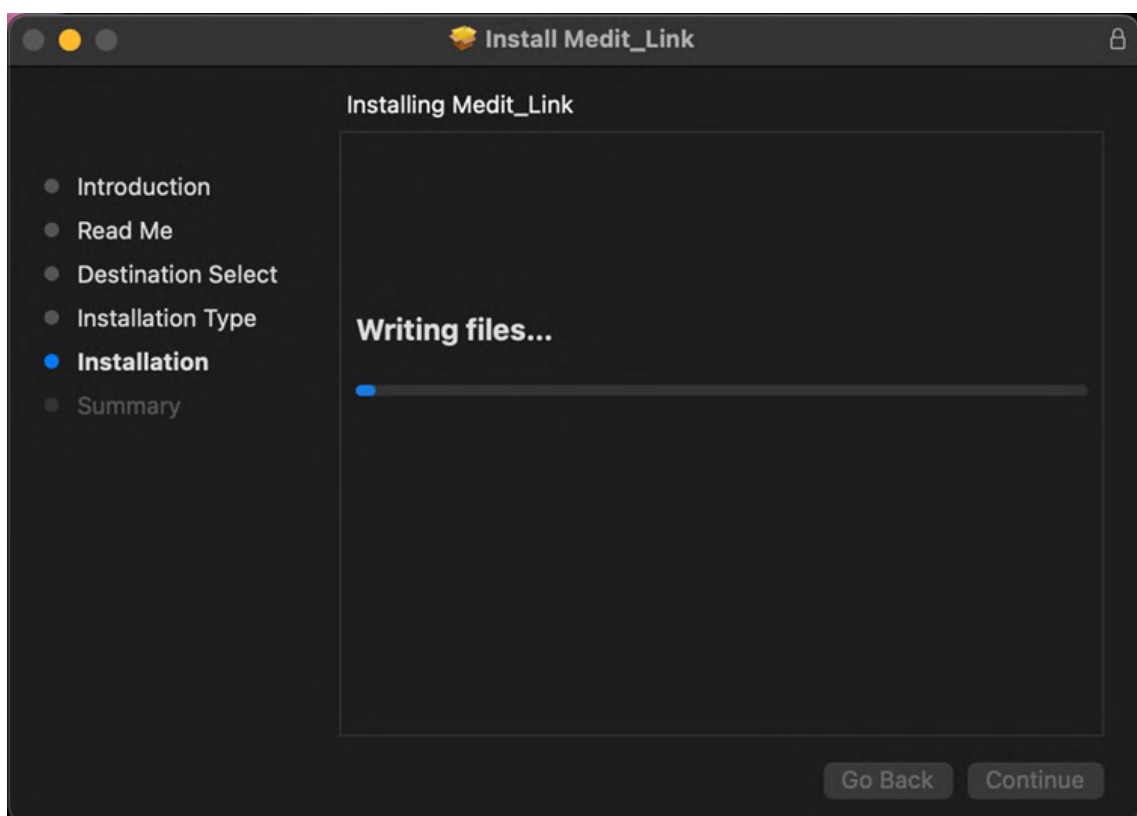


7. Натисніть «Закрити», щоб закрити вікно встановлення.

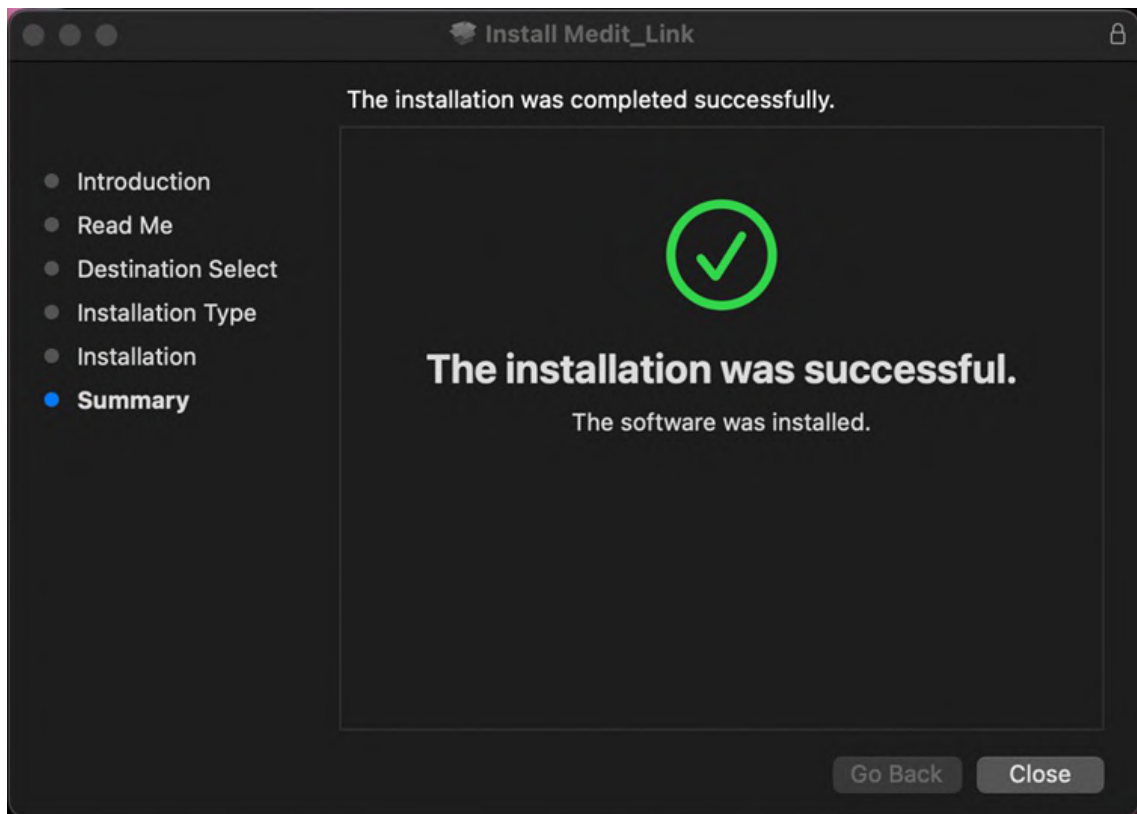

Реєстрація та вхід до системи

Вебсайт Medit Link

Зареєструйтеся в сервісі Medit Link на сайті www.meditlink.com.

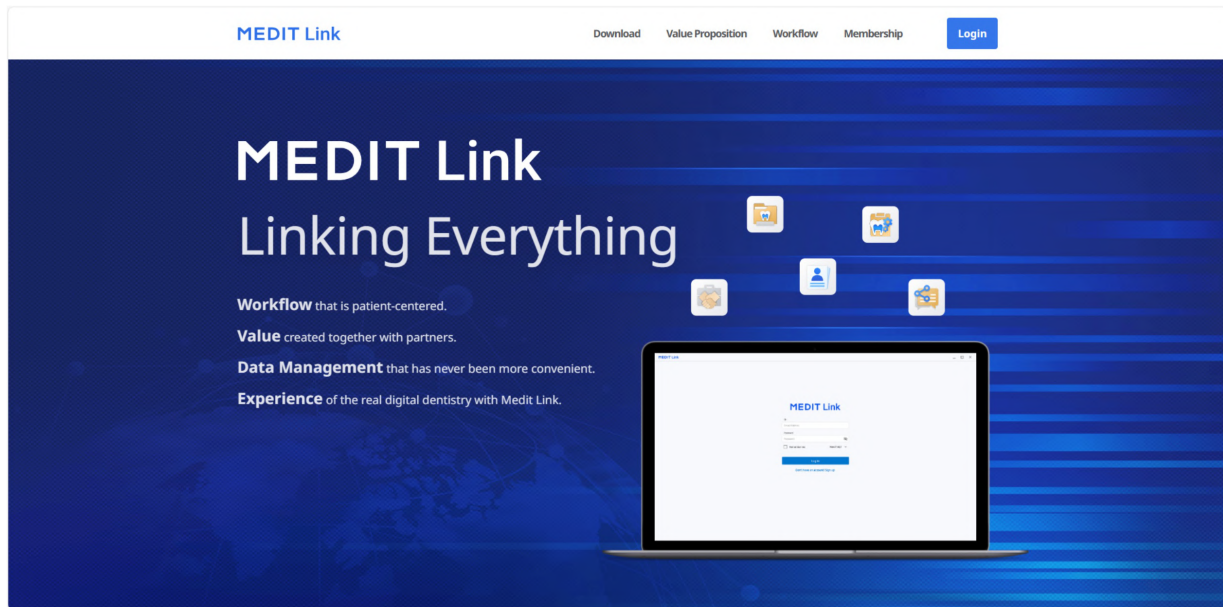

Примітка

Зареєструйтеся в сервісі Medit Link China на сайті www.meditlink.cn.

Реєстрація

Щоб використовувати сервіс Medit Link, вам необхідно зареєструвати обліковий запис. Використовувати функції, надані в Medit Link, можна після створення облікового запису клініки або лабораторії.

Для реєстрації та використання сервісу користувачі можуть вибрати один із зазначених нижче типів облікового запису з повними або обмеженими функціями й дозволами.

- Клініка: адміністратор
- Клініка: користувач
- Лабораторія: адміністратор
- Лабораторія: користувач

Адміністратор зазвичай є представником організації та має повний доступ до всіх функцій і сервісів Medit Link. Користувач має обмежений доступ.

Щоб зареєструвати обліковий запис, виконайте такі дії:

1. Натисніть посилання «Ще не маєте облікового запису? Зареєструйтеся» на сторінці входу.

MEDIT Link

ID

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? [Sign up.](#)



English (United States)



2. Прочитайте надані описи та натисніть кнопку «Зареєструвати» для бажаного типу облікового запису.

Create Your Medit Link Account



Clinic


Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

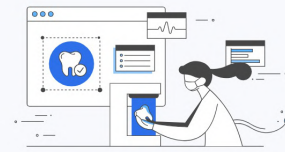

Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. На екрані з'явиться така форма реєстрації.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

View

View

View

Back

Register

- Введіть назву клініки або лабораторії, а далі, залежно від типу облікового запису, виконайте такі дії:
 - Якщо ви реєструєтесь як адміністратор, натисніть «Перевірити доступність», щоб дізнатися, чи доступна введена вами назва.
 - Якщо ви реєструєтесь як користувач, натисніть «Пошук». Адміністратор мав зареєструвати вашу організацію перед вашою реєстрацією.
- Заповніть частину форми, що залишилася, та натисніть «Зареєструвати».

Примітка

Якщо під час реєстрації ви даєте згоду на отримання маркетингової розсилки, то отримуватимете корисну інформацію про продукти та послуги компанії Medit.

- Вам буде надіслано підтверджувальний електронний лист.
- Щоб завершити процес реєстрації, підтвердьте адресу електронної пошти за допомогою отриманого посилання.

Вхід і вітальна сторінка

- Введіть свою адресу електронної пошти й пароль на сторінці входу та натисніть «Увійти».

MEDIT Link

ID

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.




English (United States)



2. Якщо ви не заповнили інформацію про свою компанію, з'явиться таке спливне вікно.

Welcome, stage-test-wh!

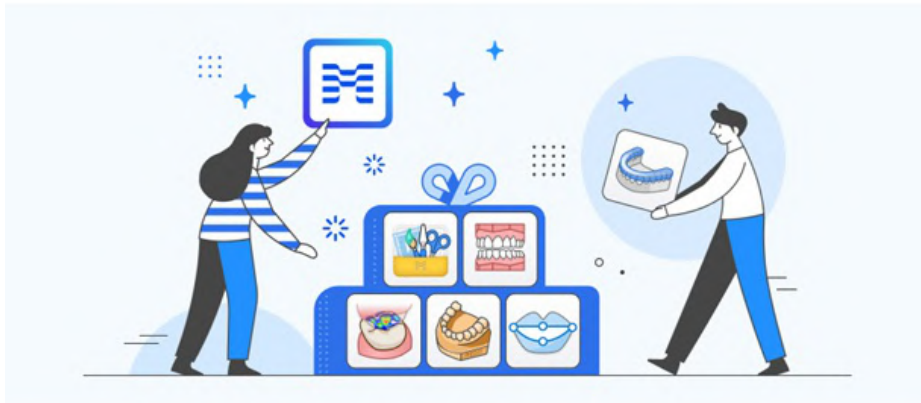

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

Примітка


Для використання сервісів Medit Link інформація про вашу клініку або лабораторію має бути введена через обліковий запис адміністратора.

3. Натисніть кнопку «Перейти до моєї клініки» або «Перейти до моєї лабораторії» та введіть інформацію про клініку або лабораторію, включно з назвою компанії, зображенням обкладинки/логотипом, послугами, адресою тощо.
4. Інформацію, введену на вітальній сторінці, можна відредагувати в будь-який час у розділі My Info > Моя клініка або Моя лабораторія в Medit Link.

Dashboard

Огляд Dashboard

Як у застосунку, так і у вебсервісі Medit Link можна переглядати статистику всієї роботи, виконаної в Medit Link, на графіках і діаграмах.

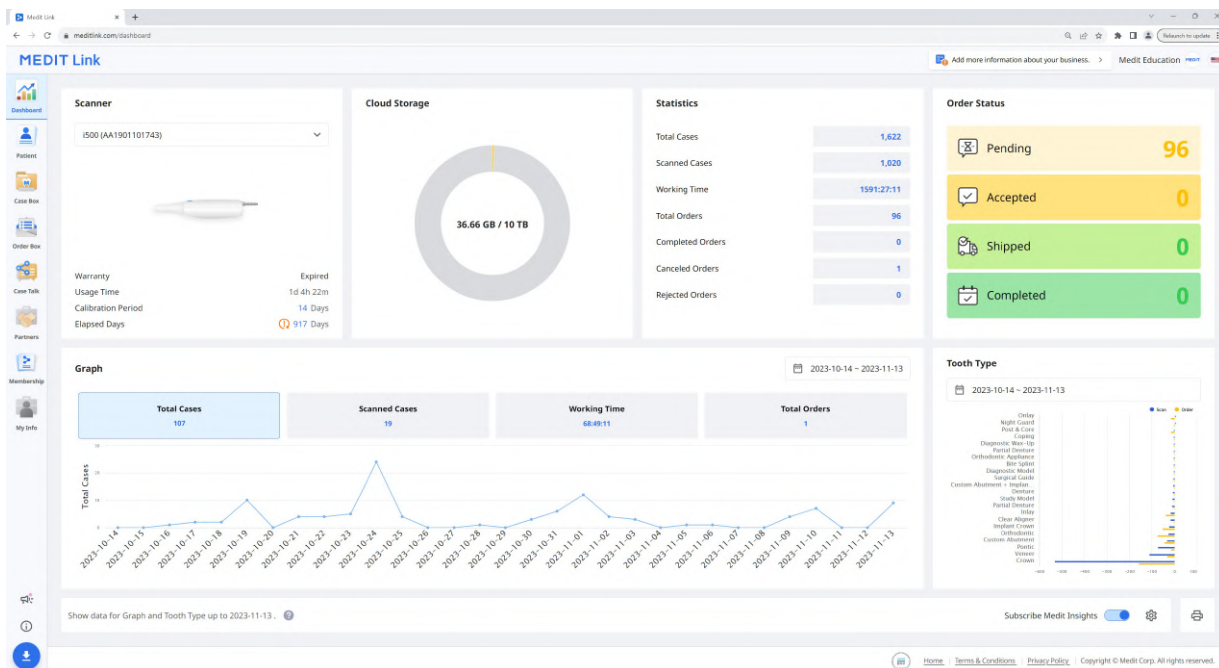

Графіки та діаграми в Dashboard показують статистику всієї роботи, виконаної в Medit Link.

Сканер	Інформація про активні сканери, включно з гарантією, часом використання сканера, інтервалом калібрування та часом, що пройшов з останнього калібрування.
Хмарне сховище	Загальний обсяг сховища та обсяг, що використовується.
Статистика	Статистика за проектами на основі статусу роботи.
Статус замовлення	Статистика за проектами на основі статусу замовлення.
Графік	Графік інформації про роботу за періодами.
Тип зуба	Статистика кількості сканувань та замовлень за типом лікування.


Medit Insights

Medit Insights – це сервіс звітів, який допомагає аналізувати статистику використання.

Примітка

Цей сервіс недоступний в Medit Link China:

- Medit Insights

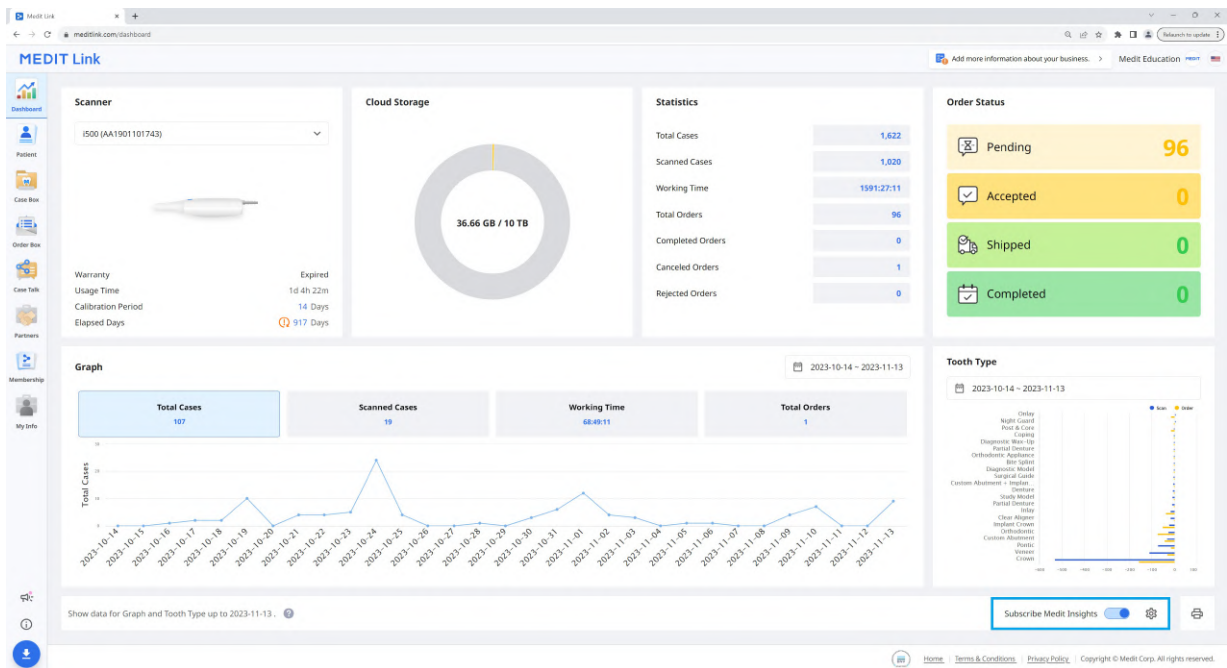

Підписка на Medit Insights

Ви можете отримувати звіт електронною поштою другого числа кожного місяця. Додаткова реєстрація не потрібна. Просто активуйте параметр «Підписка на Medit Insights».

Якщо ви не використовуєте адресу електронної пошти, яку ввели для облікового запису Medit Link, для отримання звітів Medit Insights можна вказати іншу адресу.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

Другого числа кожного місяця ви будете отримувати електронний лист зі статистикою, як показано нижче.

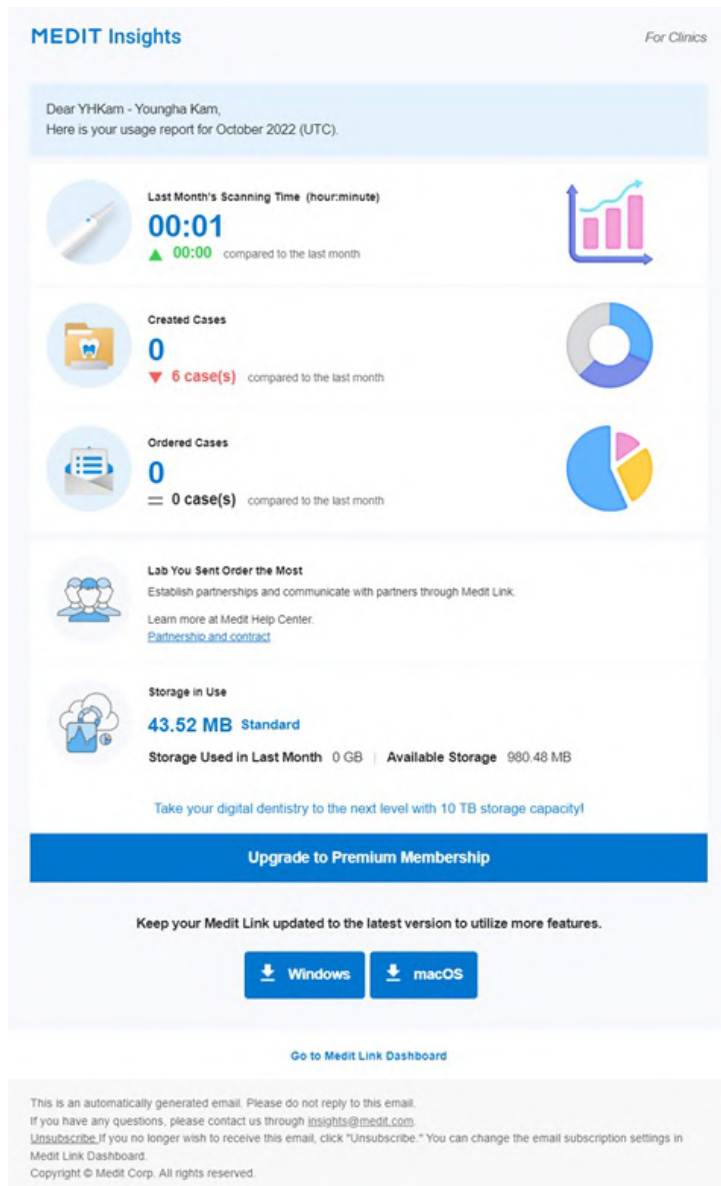

Банер	Тут Medit розміщує корисні поради та інформацію. * Якщо ви не хочете бачити банер, зніміть прапорець «Marketing and Promotion Agreement» в розділі My Info > Мій обліковий запис.
Статистична інформація	Тут показується статистична інформація, така як час сканування, створені проєкти та лабораторія, якій найчастіше відправлялися замовлення.
Завантажити Medit Link	Кнопка містить посилання на завантаження Medit Link.
Dashboard	Вся статистична інформація ґрунтується на інформації з вашого Dashboard. Детальнішу інформацію дивіться в Dashboard.

Скасування підписки на Medit Insights

Деактивуйте параметр «Підписка на Medit Insights» в Dashboard або натисніть «Відписатися» в отриманому електронному листі.

Patient

Ви можете керувати проектами, використовуючи ім'я пацієнта та ідентифікатор пацієнта.

Усі пацієнти, зареєстровані через застосунок Medit Link, показуються у вигляді переліку, що полегшує керування пацієнтами та їхніми проектами.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
159	121	1212-12-04		1	-	2025-02-13 16:17	2019-01-29 14:12
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	2	2025-01-06 18:28	2025-02-13 16:17	2025-01-13 15:07
hik.lee	-	-	-	1	-	2025-02-12 15:23	2022-04-18 20:06
TEST	-	-	-	1	-	2025-02-12 09:35	2025-02-11 17:17
BLATRIX Charline	d82cb01f1e1...	1986-01-05	-	1	2025-01-06 18:28	2025-02-10 18:22	2025-01-14 12:17
exocad form only	-	-	-	1	-	2025-02-09 12:06	2025-02-09 12:06
240625 엔티스 스캔배디 매칭	-	-	-	2	2024-06-25 15:14	2024-07-09 10:21	2024-07-09 10:21
m	-	-	-	0	-	2024-04-16 11:16	2024-04-16 11:16
3.3.0.136 TEST	-	-	-	1	-	2024-04-12 15:17	2024-04-12 15:17
3.3.0 STAGE TEST	-	-	-	1	-	2024-04-09 14:58	2024-04-09 14:58

Пошук пацієнта

1. Виберіть потрібний критерій пошуку між варіантами «Ім'я пацієнта» та «Ідентифікатор пацієнта» у випадному меню в правому верхньому кутку переліку пацієнтів.

View Options

Patient ID ^ Search Patient ID


Patient Name

Patient ID

2. Введіть ім'я або ідентифікатор пацієнта для пошуку відповідно до вибраного критерію.
3. Буде показано лише пацієнтів із введеним вами ім'ям або ідентифікатором пацієнта.

Case Box/Work Box


У Case Box (клініка) або Work Box (лабораторія) показуються всі проєкти, створені користувачем у Medit Link. Файли можна переглядати у веббраузері без встановлення окремої програми.

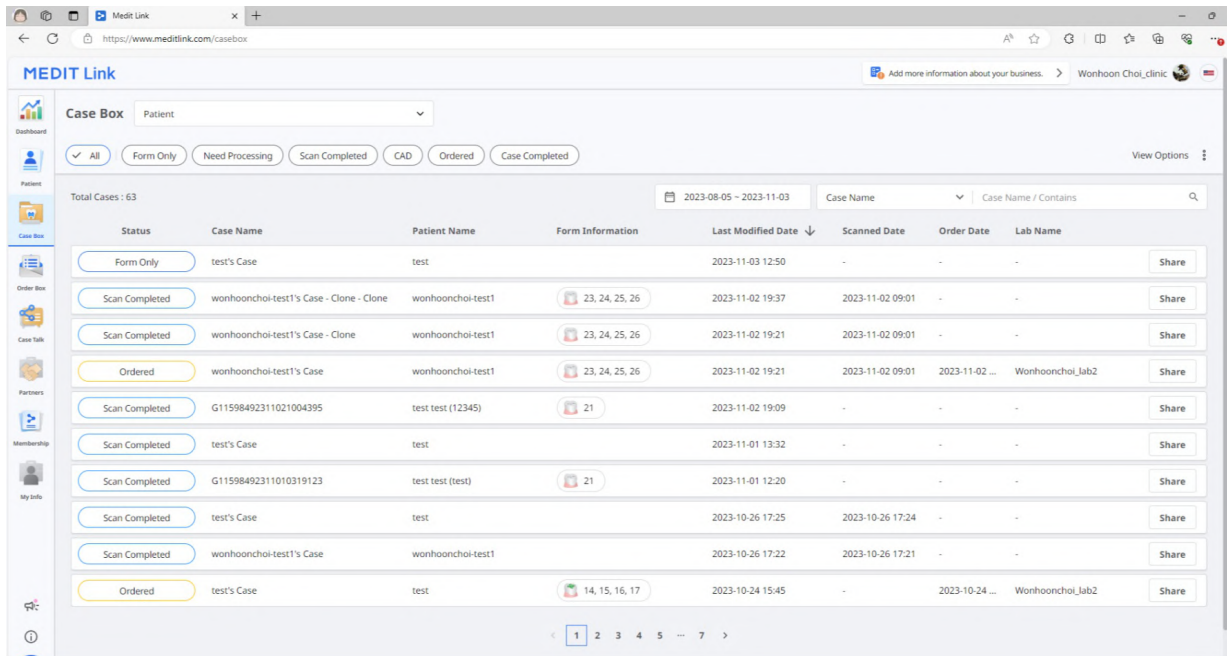

Фільтрування проєктів

Фільтрування за пацієнтом

Ви можете фільтрувати проєкти за пацієнтами. Це стане в пригоді, коли потрібно знайти проєкти для конкретного пацієнта.

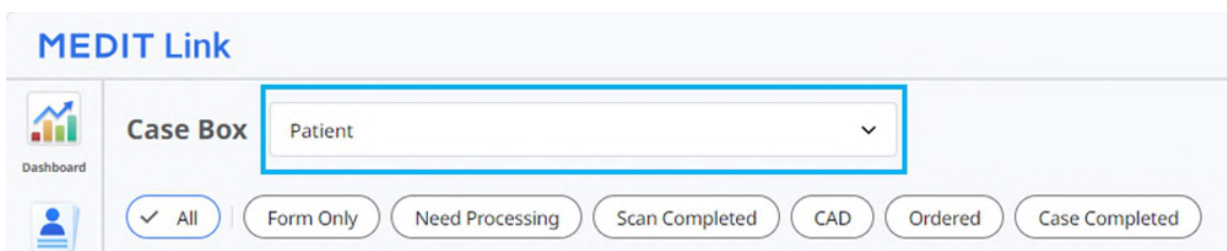

1. Введіть ім'я пацієнта в полі пошуку.

Patient

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. Виберіть пацієнта в результатах пошуку.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
+ 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)


☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. В переліку відображатимуться лише проекти для вибраного пацієнта, що спрощує пошук потрібних проектів.

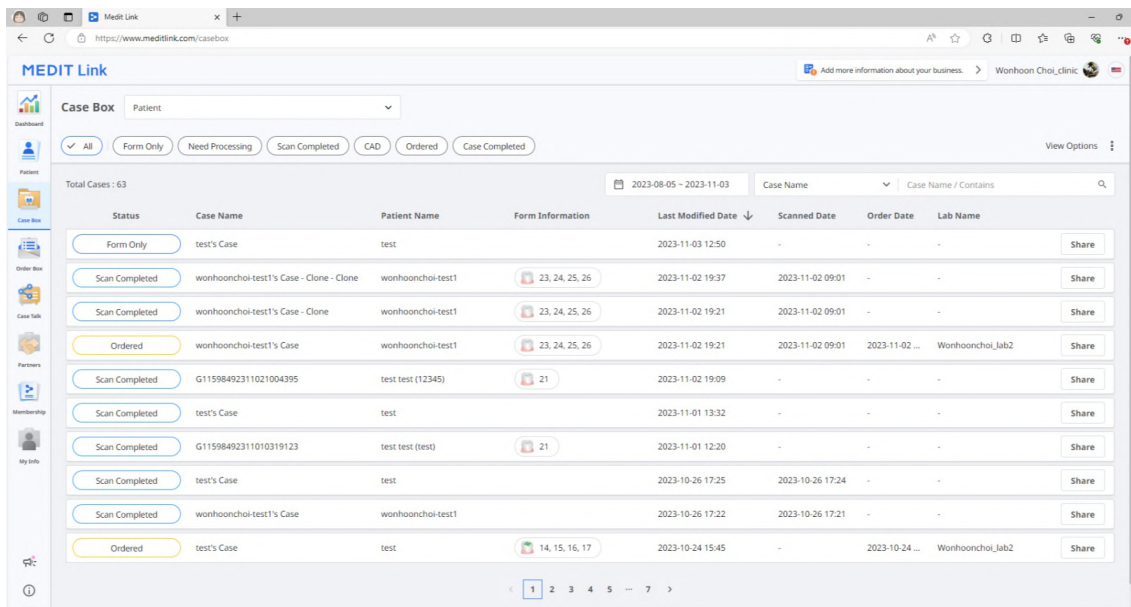

Фільтрування за статусом

Ви можете фільтрувати проекти за їхнім статусом.

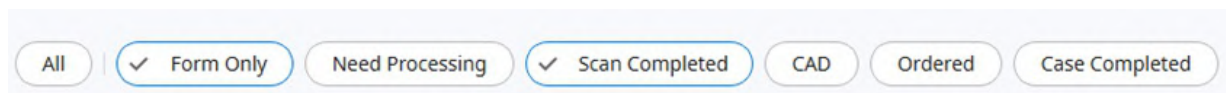

- Натисніть на статус, який хочете переглянути. У браузері з'являться лише ті проекти, які мають вибраний статус.
- Можна вибрати декілька статусів одночасно.

Залежно від типу облікового запису можуть бути такі статуси.

Case Box (клініка)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (лабораторія)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Фільтрування за періодом

Ви можете фільтрувати проекти, останні зміни до яких були внесені протягом заданого періоду.

1. Натисніть фільтр діапазону дат.



2. Виберіть діапазон.

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- Всі — будуть показані всі проекти.
- Користувачський діапазон — вкажіть дату початку та закінчення, щоб показати всі проекти, змінені в цей період.
- Сьогодні — будуть показані проекти, останні зміни до яких були внесені сьогодні.
- Вчора — будуть показані проекти, останні зміни до яких були внесені вчора.
- Останні 7 днів — будуть показані проекти, останні зміни до яких були внесені протягом останніх 7 днів, не враховуючи сьогоднішній день.
- Останні 30 днів — будуть показані проекти, останні зміни до яких були внесені протягом останніх 30 днів, не враховуючи сьогоднішній день.
- Останні 90 днів — будуть показані проекти, останні зміни до яких були внесені протягом останніх 90 днів, не враховуючи сьогоднішній день.
- Цей місяць — будуть показані проекти цього місяця.
- Попередній місяць — будуть показані проекти попереднього місяця.

Перелік проектів оновлюватиметься в режимі реального часу з урахуванням проектів, створених або змінених протягом вибраного періоду.

Фільтрування за пошуком

Ви можете використовувати можливості пошуку, щоб легко та швидко знайти необхідну інформацію.


Case Name

Case Name / Contains

Залежно від типу облікового запису можна використати такі критерії пошуку:

Case Box (клініка)	Назва проекту, ім'я пацієнта, ідентифікатор пацієнта, назва лабораторії
Work Box (лабораторія)	Назва проекту, ім'я пацієнта, назва клініки, ідентифікатор замовлення

Деталі проекту

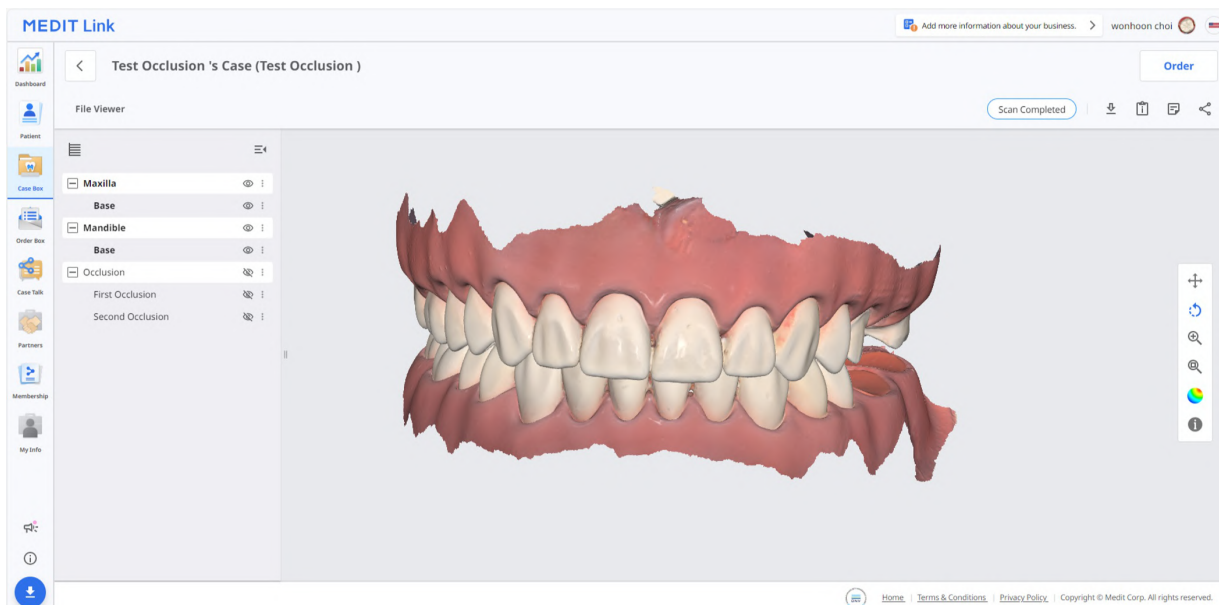

В Case Box/Work Box надаються такі інструменти керування проектом:

	Статус проекту	Показує статус проекту.
	Перейти до Order Box/In Box	Дозволяє перейти до проекту в іншому Box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Завантажити	Дозволяє завантажити файли проекту на локальний ПК.
	Інформація про проект	Дозволяє переглянути деталі проекту, зберегти їх як PDF-файл або надрукувати.
	Примітка й теги	Дозволяє додати примітку або теги під час реєстрації або замовлення проекту. Використовуйте їх для передавання партнерам будь-якої додаткової або допоміжної інформації про проект.
	Поділитися	Дозволяє створити посилання для надання доступу. Користувачі з цим посиланням можуть отримати доступ до 3D-даних у браузері, наприклад Chrome, Firefox або Safari, без встановлення додаткових програм.

Order Box/In Box

В Order Box (клініка) або In Box (лабораторія) показуються проекти, замовлені в Medit Link.

Деталі замовлення

1	Назва проекту та ім'я пацієнта.
2	Функції для керування замовленням (прийняття/скасування, доставлення/отримання).
3	Доступні вкладки: «Замовлення», «Переглядач файлів».
4	Функції для керування проектами та файлами: статус проекту, ярлики для детальної інформації, інформація про проект, примітка та теги тощо.
5	Детальна інформація щодо замовлення, включно з ідентифікатором замовлення, ім'ям пацієнта, назвою партнера, датою сканування, датою замовлення, датою доставлення, а також приміткою та тегами.
6	Інформація про замовлений продукт і статус замовлення.


Вкладки в Order Box/In Box

Замовлення	Переглядач файлів
Детальна інформація щодо замовлення, включно з ідентифікатором замовлення, ім'ям пацієнта, назвою партнера, датою сканування, датою замовлення, датою доставлення, а також приміткою та тегами.	Перегляд файлів, створених програмами сканування/CAD. Переглядач файлів дозволяє переглядати отримані або прикріплені 3D-моделі та 2D-зображення й керувати ними.

Case Talk

Проектами, створеними в Medit Link, можна поділитися з вказаними людьми, всіма, хто має посилання для спільного доступу, або зареєстрованими користувачами Medit Link.

Ви можете переглянути перелік проектів зі спільним доступом в розділі Case Talk в застосунку Medit Link і вебсервісі Medit Link.

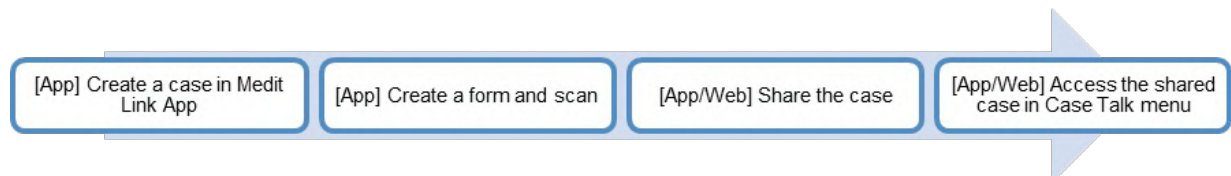


Проекти зі спільним доступом можна переглядати через веббраузер, не встановлюючи для цього окрему програму. Це дозволяє легко обмінюватися 3D-даними на різних пристроях.


Створення Case Talk

Ви можете генерувати посилання для спільного доступу до проекту, створеного в Case Box/Work Box.

1. Знайдіть проект, яким ви хочете поділитися, та натисніть кнопку «Поділитися» праворуч.

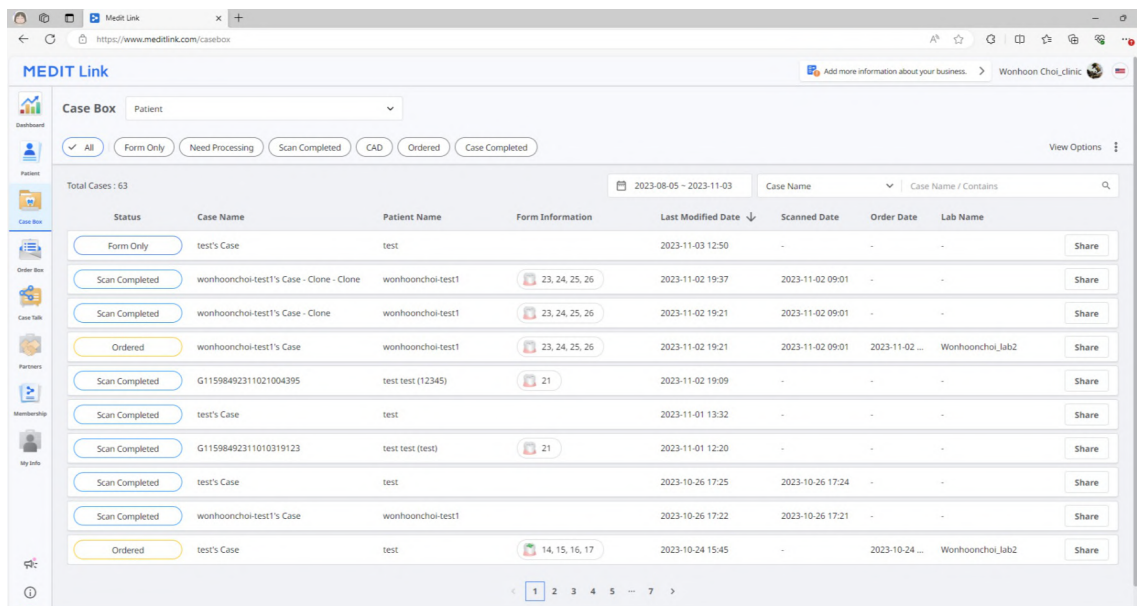

2. Виберіть файли, якими ви хочете поділитися.

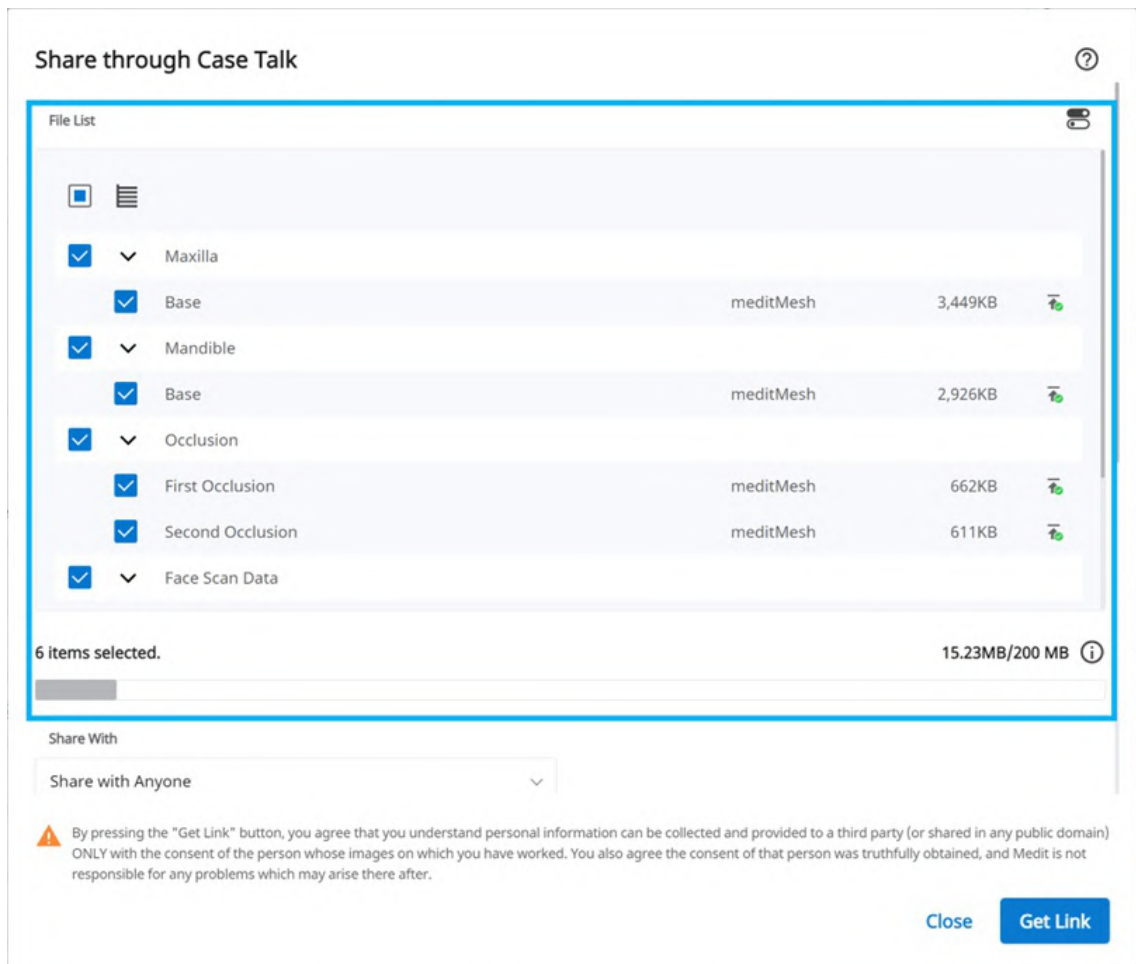

3. Задайте тип дозволу та параметри спільного доступу.
4. Натисніть «Створити посилання», щоб створити посилання для спільного доступу.

Встановлення типу дозволу та параметрів спільного доступу

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Share via

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close


Get Link

37

Поділитися з	• Поділитися з усіма Буде створено посилання для спільного доступу. Ви можете надати доступ усім. • Поділитися з конкретними людьми Буде створено посилання для спільного доступу, і його буде надіслано конкретним людям.
Поділитися через	Якщо ви виберете «Поділитися з конкретними людьми», то зможете поділитися посиланням різнomanітними способами. • Адреса електронної пошти • SMS • Partners
Дата закінчення строку дії	Встановіть дату закінчення строку дії посилання. Після закінчення строку дії, люди яким було надано доступ, більше не будуть мати доступ до файлів. Строк дії посилання можна продовжити на період 90 днів з поточного дня.
PIN-код	Встановіть 6-значний код доступу для убезпечення даних.
Поділитися іменем пацієнта	Якщо ви відмітите цю опцію, всі люди, у яких є посилання, побачать ім'я пацієнта.
Надати дозвіл на завантаження	Якщо ви відмітите цю опцію, всі користувачі з посиланням зможуть завантажити файли.
Дозволити коментарі	• Якщо ви відмітите цю опцію, то зможете обмінюватися коментарями з користувачами, в яких є посилання. • Якщо ви не відмітите цю опцію, отримувач зможе бачити ваші коментарі, але сам не зможе додавати коментарі.
Коментар	Ви можете залишити коментар у цьому розділі.

Деталі Case Talk

Ви можете переглядати файли в проєкті зі спільним доступом. На сторінці деталей Case Talk доступні такі функції:

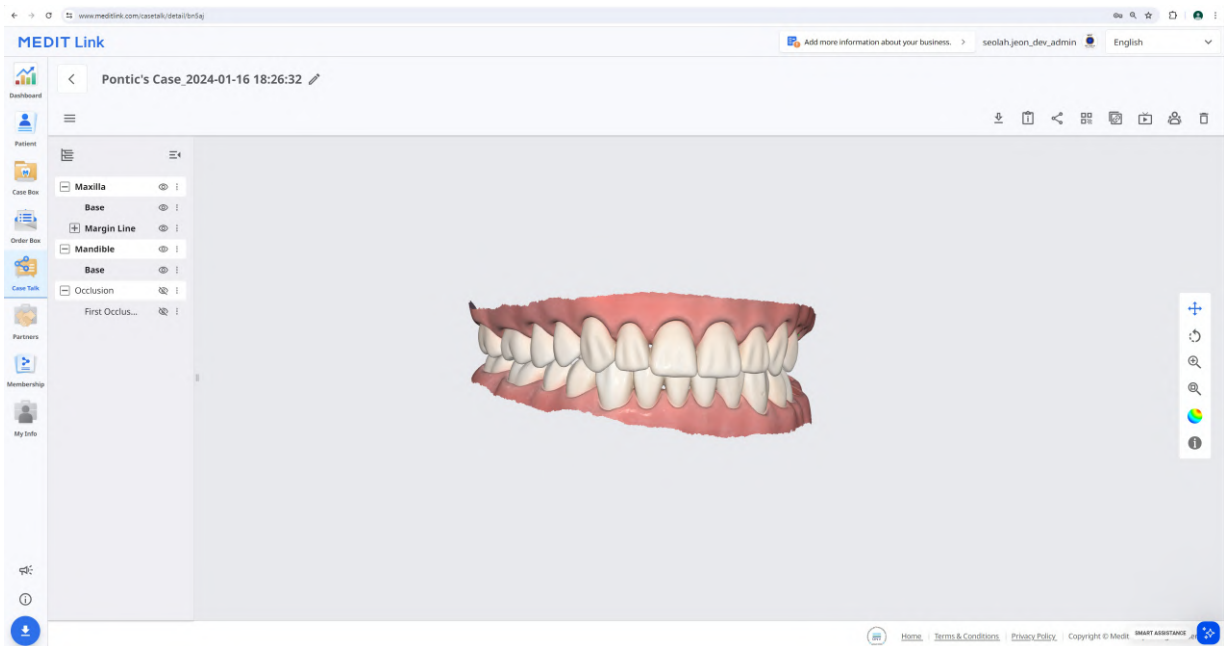

	Завантажити	Дозволяє завантажити всі файли проєкту на локальний ПК.
	Інформація про проєкт	Показує детальну інформацію про проєкт.
	Поділитися	Дозволяє змінити параметри спільного доступу.
	QR-код	Дозволяє поділитися проєктом за допомогою QR-коду.
	Копіювати посилання	Копіює посилання для спільного доступу до буфера обміну. За посиланням можна подивитися файли спільного доступу у веббраузері.
	В реальному часі	Дозволяє ділитися своїм екраном із користувачами, які під'єдналися за посиланням. Спільний доступ до екрана надається всім під'єднаним користувачам.
	Учасники	Показує всіх користувачів, які отримали доступ через посилання для спільного доступу.
	Видалити	Видаляє посилання для спільного доступу. Видалене посилання буде недоступне.

Примітка


В Medit Link China недоступні такі функції:

- В реальному часі
- Учасники

Web Viewer

Дані, до яких надано спільний доступ у Case Talk, можна переглядати в веббраузері.

Ви можете спілкуватися з людьми, яким надане посилання для спільного доступу, за допомогою анотацій і коментарів.

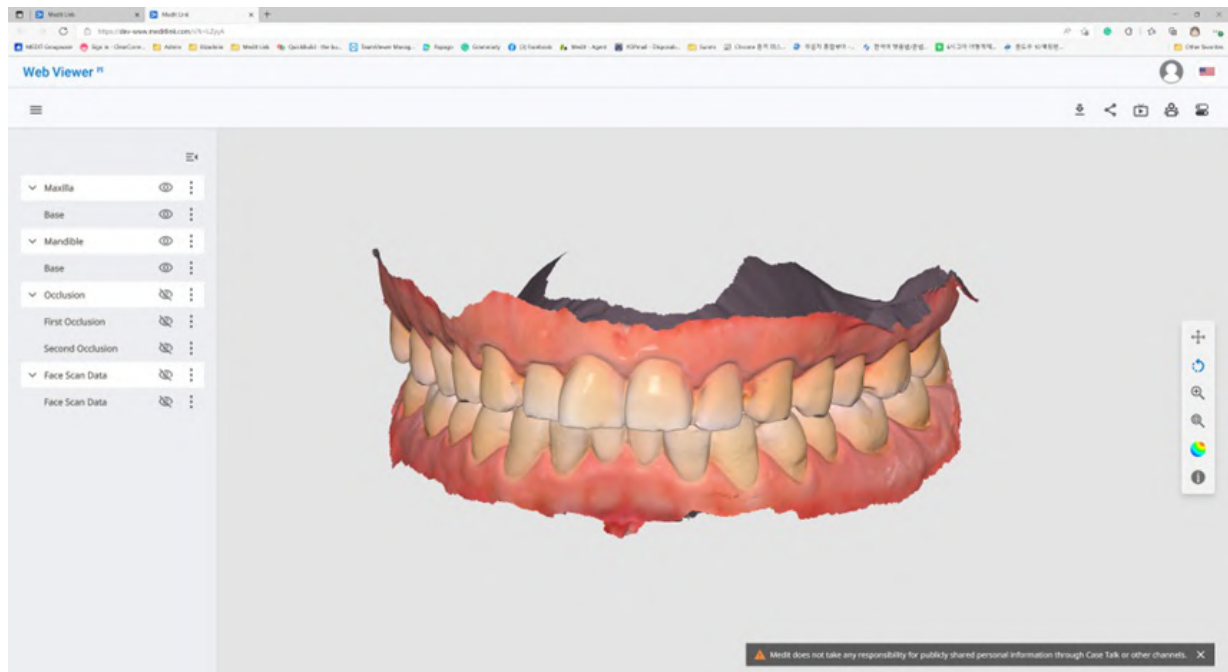

	Завантажити	Дозволяє завантажити всі файли проекту на ПК.
	Інформація про проект	Показує детальну інформацію про проект.
	Поділитися	Дозволяє змінити параметри спільного доступу.
	QR-код	Дозволяє поділитися проектом за допомогою QR-коду.
	В реальному часі	Дозволяє ділитися своїм екраном із користувачами, які під'єдналися за посиланням. Спільний доступ до екрана надається всім під'єднаним користувачам.
	Учасники	Показує всіх користувачів, які отримали доступ через посилання для спільного доступу.
	Маркування зубів	Змінює систему маркування зубів.


Примітка

В Medit Link China недоступні такі функції:

- В реальному часі
- Учасники

Анотація

Ви можете додавати анотації до вибраної ділянки 3D-моделі. Додані анотації може подивитися будь-хто, хто має посилання.

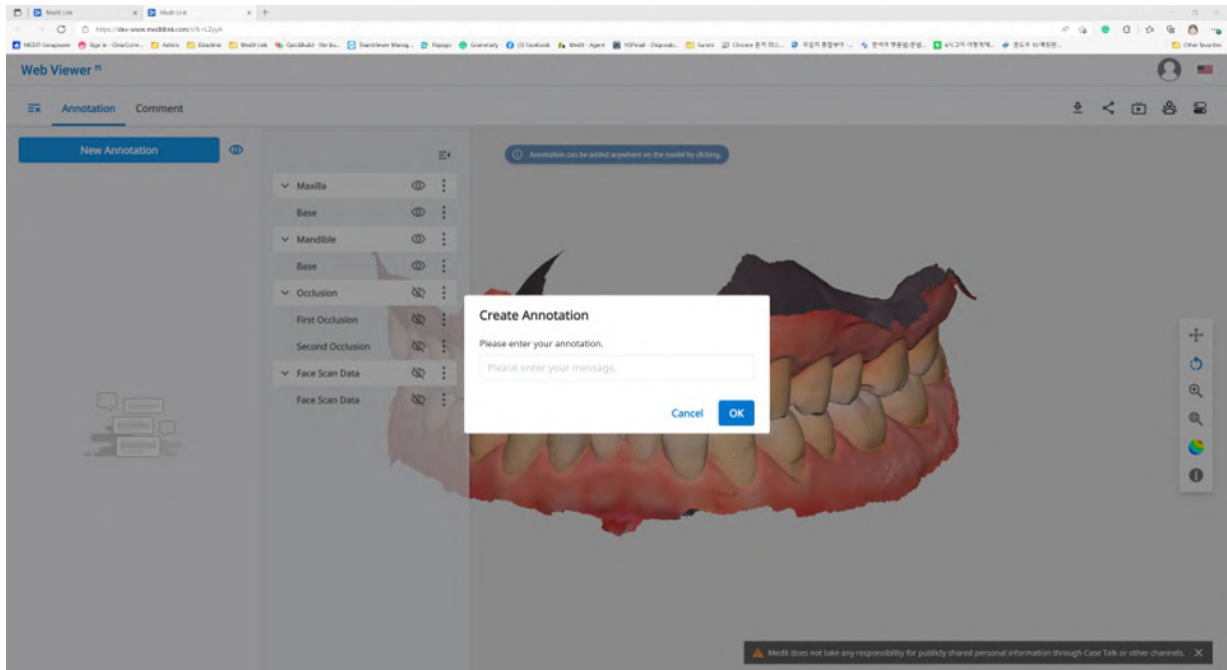


Примітка

Цей сервіс недоступний в Medit Link China:


- Анотація

1. Виберіть вкладку «Анотація» в меню в лівому верхньому куті. Використовуйте кнопку «Нова анотація», щоб додати анотацію в будь-якому місці даних одним клацанням миші.
2. Введіть повідомлення та натисніть «ОК», щоб його зберегти.

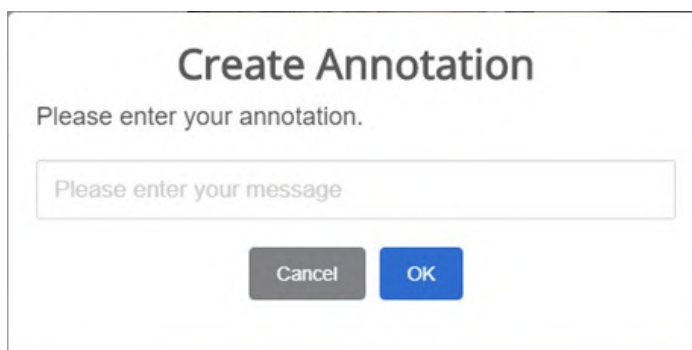

The dialog box is titled 'Create Annotation'. It contains the text 'Please enter your annotation.' followed by a text input field with the placeholder 'Please enter your message'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. Ви можете використовувати анотації для обміну думками.
Клацніть створену анотацію, щоб ввести відповідь на неї, і натисніть «Надіслати».

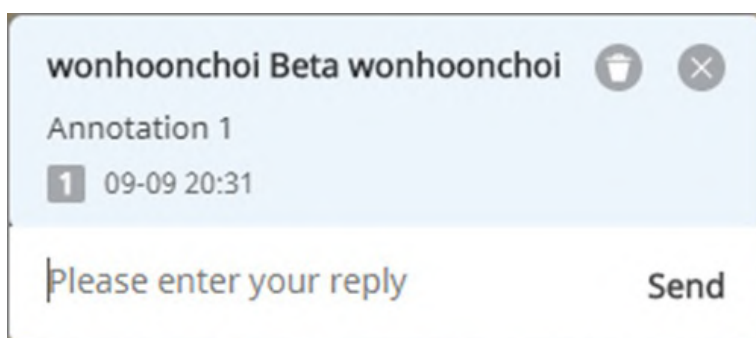

The interface shows a comment card for 'wonhoonchoi Beta wonhoonchoi' with the title 'Annotation 1' and a timestamp '1 09-09 20:31'. Below the card is a text input field with the placeholder 'Please enter your reply' and a 'Send' button.

Коментарі

Ви можете спілкуватися з користувачами, які мають доступ до посилання, за допомогою вкладки «Коментар» у меню Web Viewer.

Примітка

Цей сервіс недоступний в Medit Link China:

- Коментар

Надання доступу до екрана в реальному часі


Ви можете ділитися своїм екраном у режимі реального часу.

Примітка

Цей сервіс недоступний в Medit Link China:

- В реальному часі

1. Натисніть «В реальному часі», щоб поділитися своїм екраном Web Viewer із під'єднаними користувачами.


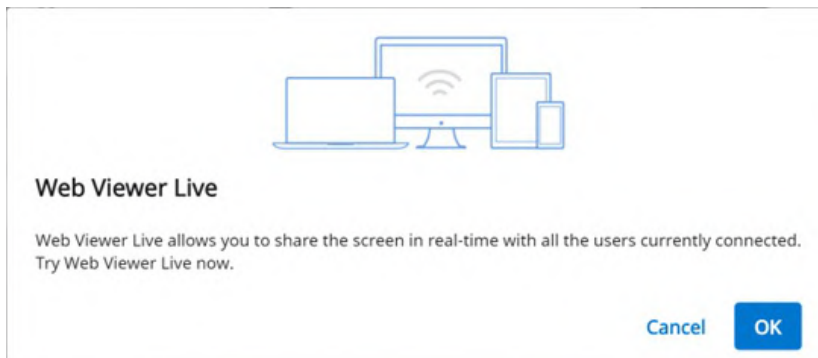


2. Натисніть «ОК», щоб почати ділитися екраном.
3. Користувачі, які перейшли за посиланням, мають схвалити ваш запит на демонстрацію екрана.
4. Екран користувача, який ініціював демонстрацію свого екрана, буде демонструватися в режимі реального часу користувачу, який схвалив запит.


Дерево даних

Всі дані групуються та показуються відповідно до атрибутів у дереві даних. Ви можете показувати або приховувати дані, регулювати прозорість тощо.

Елементи керування деревом даних

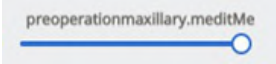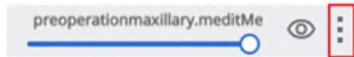Показати/ сховати	Натисніть значок ока, щоб показати або сховати дані. Керуйте видимістю групи даних або окремого файлу.
Непрозорість	Наведіть курсор миші на видимий елемент, щоб побачити повзунок для налаштування непрозорості. Використовуйте його, щоб змінити прозорість даних. 
Розширене меню	Розширене меню знаходиться праворуч від кожного елемента дерева даних. Воно містить такі функції:  • Показати лише це — ховає всі інші дані, окрім поточних. • Сховати — ховає поточні дані.

Елементи керування 3D-моделлю

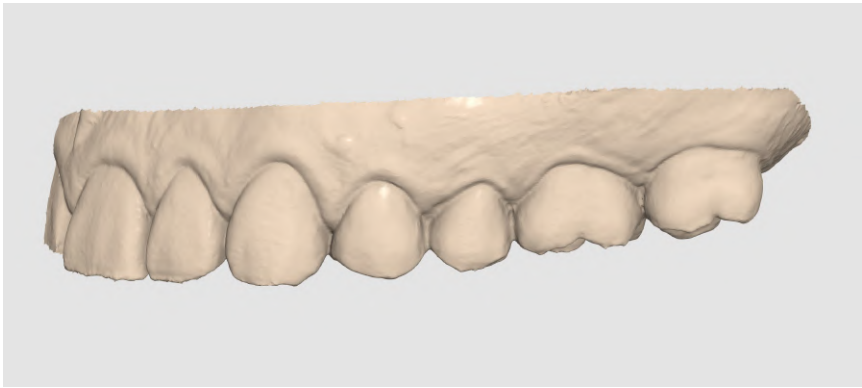+	Панорамувати	Переміщує модель.
○	Обертати	Обертає модель.
⌕	Збільшити/зменшити	Збільшення та зменшення моделі.
⌕	Підігнати	Розміщення моделі в центрі екрана.
•	Режим показу даних	Матовий Перегляд даних у кольорі з матовою поверхнею (рендеринг Фонга). 
•	Монохромний	Перегляд даних в одному кольорі. 

Partners

Ви можете шукати потенційних партнерів, щоб надіслати запит на партнерство, а також переглядати перелік поточних партнерів.


Примітка

Сервіси, які використовують Google Maps, недоступні в Medit Link China.

Пошук партнерів


Пошук користувачів Medit Link можна здійснювати за назвою та/або адресою їхньої компанії.

У результатах пошуку можна надіслати запит на партнерство компаніям, з якими ви хочете працювати.

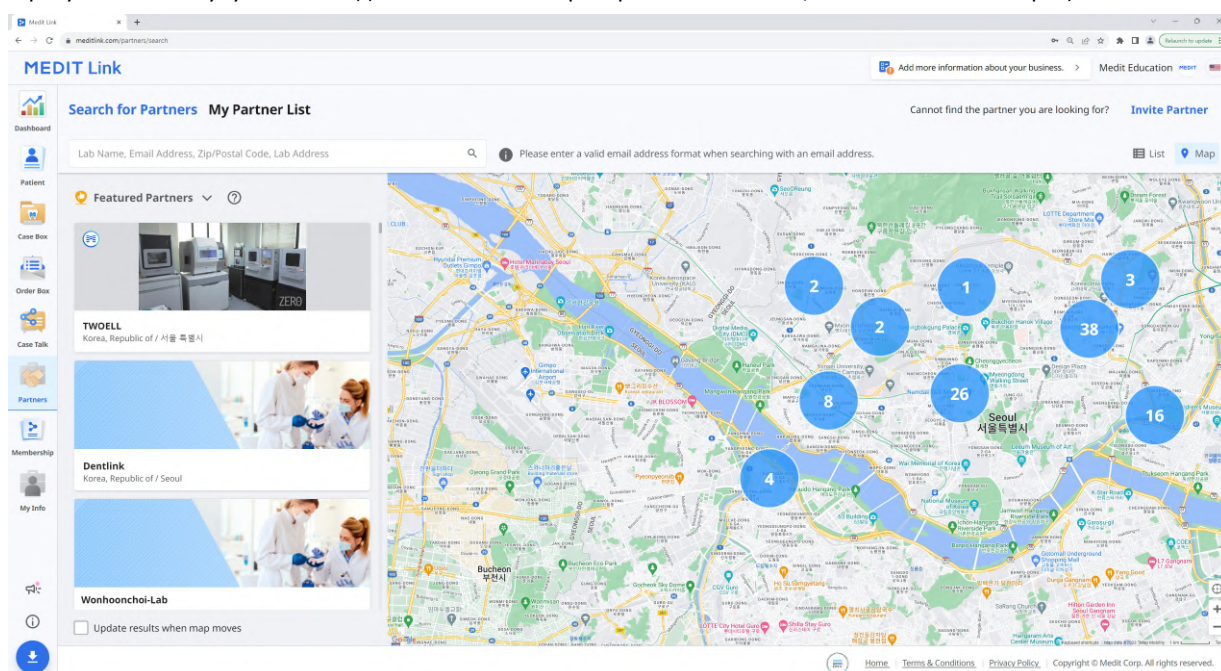

Перелік моїх партнерів

У розділі «Перелік моїх партнерів» можна подивитися всі поточні партнерства.

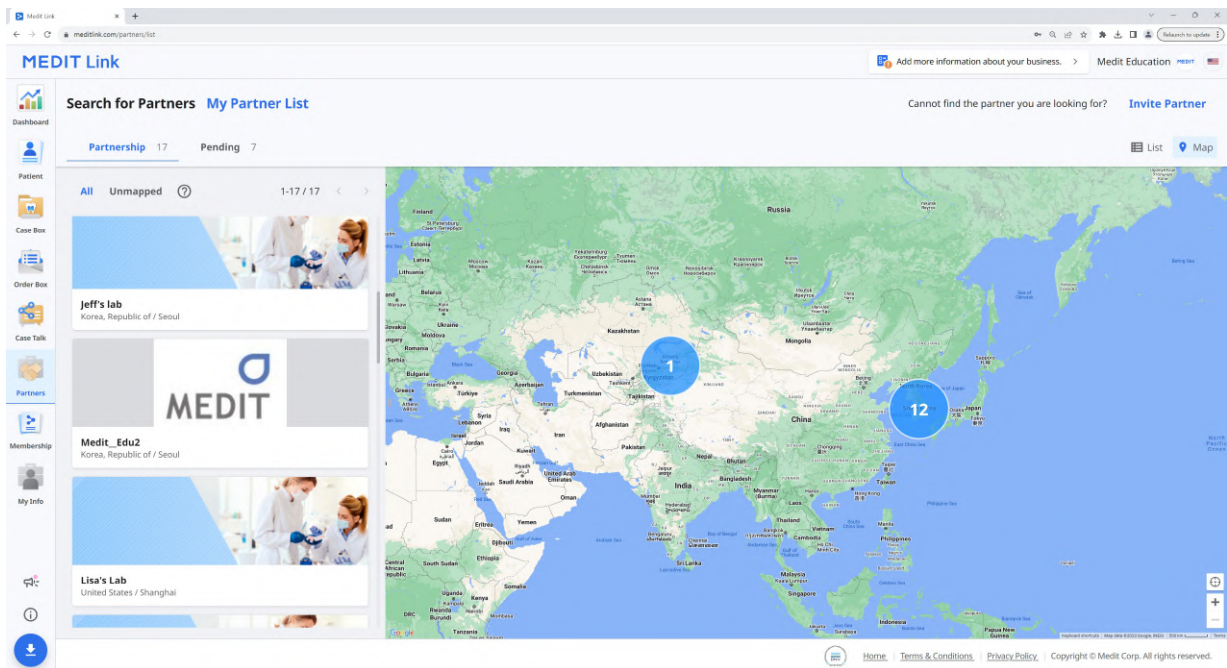

Запрошення партнера

Якщо ви хочете працювати з якоюсь клінікою або лабораторією, то можете запросити їх приєднатися до Medit Link. Партнерство буде встановлено автоматично, коли ця компанія прийме запрошення.

1. Натисніть «Запросити партнера» у верхньому лівому куті екрана.
2. Введіть адресу електронної пошти компанії, з якою ви хочете працювати, і надішліть їй запрошення із запитом на партнерство.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

3. Як тільки запрошена компанія прийме запрошення та зареєструється у Medit Link, партнерство буде встановлено автоматично.


Membership

Тарифний план

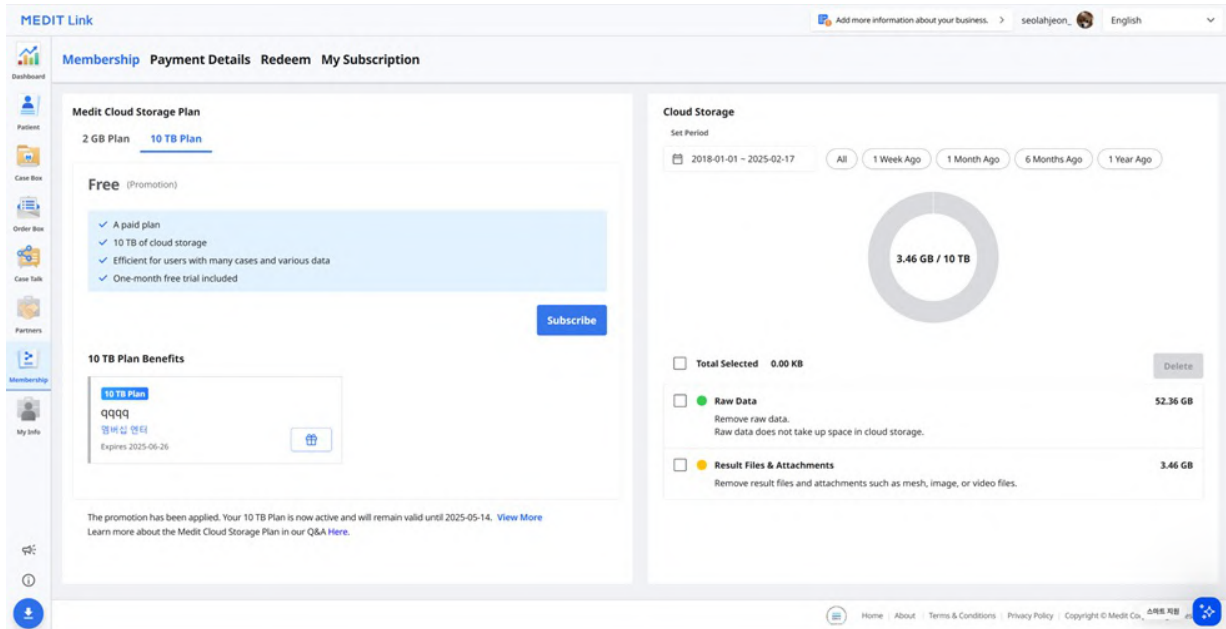

Medit Cloud Storage Plan

Ви можете ознайомитися з тим, що пропонується в кожному тарифному плані, включно з купонами на знижку та ваучерами, а також переглянути поточний статус підписки. Ви можете підвищити тарифний план або скасувати підписку в будь-який час.

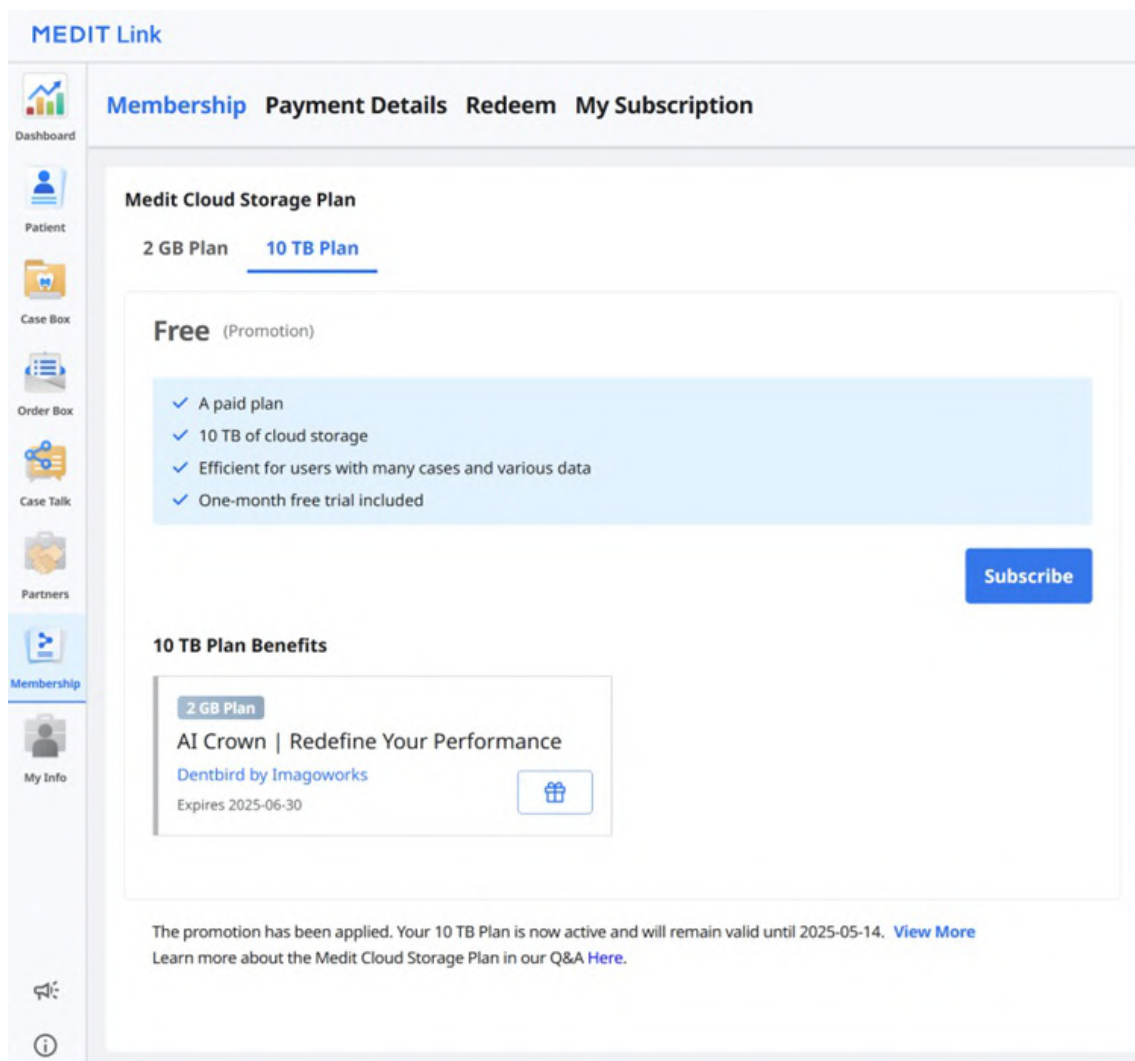

Medit Link пропонує такі тарифні плани хмарного сховища:

2 GB Plan

- Безплатний стандартний план для всіх зареєстрованих користувачів
- 2 GB хмарного сховища
- Для нових користувачів

10 TB Plan

- Платний план
- 10 TB хмарного сховища
- Для користувачів із великою кількістю проєктів та різноманітними даними
- Безплатна пробна версія на один місяць


	2 GB Plan	10 TB Plan
Хмарне сховище	2 GB	10 TB
Щомісячна оплата	Безплатно	9,99\$/місяць
* У хмарному сховищі необроблені дані не враховуються як використане місце.		

Примітка

Тарифні плани скоро будуть доступні в Medit Link China. Ви можете користуватися планом 10 TB Plan безплатно до офіційного випуску функції.

Хмарне сховище

Ви можете керувати своїм хмарним сховищем у правій частині вікна.

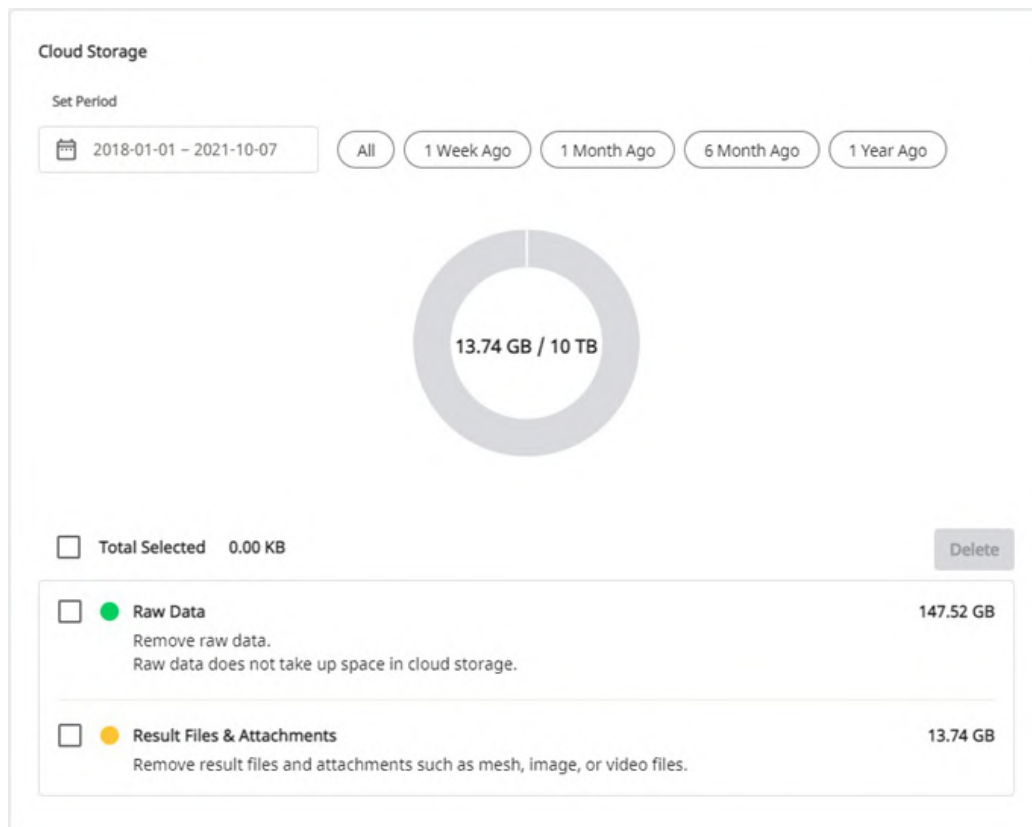

Задати період	Задайте період, щоб видалити дані, створені протягом цього періоду. - Усі — буде показано всі файли. 1 тиждень тому — буде показано всі файли, з моменту створення яких пройшов тиждень. 1 місяць тому — буде показано всі файли, з моменту створення яких пройшов місяць. 6 місяців тому — буде показано всі файли, з моменту створення яких пройшло шість місяців. 1 рік тому — буде показано всі файли, з моменту створення яких пройшов рік.
Необроблені дані	Необроблені дані не займають місце у хмарному сховищі, тому їх немає на круговій діаграмі. Однак за потреби звідси можна керувати необробленими даними, наприклад видалити їх для захисту особистої інформації пацієнта.
Результати й вкладення	Файли результатів та вкладення займають місце у хмарному сховищі. Якщо воно заповнене, ви можете вивільнити місце, видаливши непотрібні файли.
Видалити	Видаліть вибрані файли з хмарного сховища, щоб звільнити місце.

Підписка

Якщо зараз ви використовуєте тарифний план 2 GB Plan або тарифний план 10 TB Plan із промокодом, то можете підписатися на тарифний план 10 TB Plan.

Оплата здійснюється за допомогою сервісу Stripe (www.stripe.com).

1. Перейдіть до розділу Тарифний план > Medit Cloud Storage Plan > 10 TB Plan та натисніть кнопку «Підписатися».

Medit Cloud Storage Plan

2 GB Plan 10 TB Plan

Free (Promotion)

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

2. Перегляньте опис тарифного плану 10 TB Plan і знову натисніть «Підписатися».

Subscribe Membership



10 TB Plan 9.99\$ USD / Monthly

- ✓ Subscribe now to keep your 10 TB Plan after the promotion expires.
- ✓ You will pay a subscription fee after the current promotion expires. If you don't wish to pay, you can unsubscribe before payment.

* VAT is not included.


* Learn more about the Medit Cloud Storage Plan in our Q&A [Here](#).

Cancel

Subscribe

3. Перевірте ціну й умови та введіть інформацію, необхідну для оплати. Далі натисніть «Підписатися».

Cancel Subscription

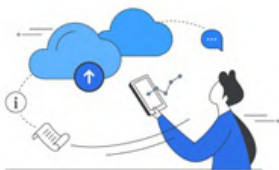

Are you sure you want to cancel your **10 TB Plan**?

✓ By confirming, you will automatically be switched to the free 2 GB Plan.
Enjoy full access to the features and storage of your current plan through to 2025-02-20.

ⓘ Please note that all uploaded files will be retained regardless of the plan you choose.
If your storage exceeds the 2 GB limit, you won't be able to upload new files.

*Click [here](#) to learn more about our membership plans.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

3. Щоб підтвердити, що ви хочете відписатися, знову натисніть «Скасувати підписку» в спливному вікні.

Confirm Subscription Cancellation

Your subscription will be canceled on 2025-02-20.

Stay Subscribed

Cancel Subscription

4. Підписку буде скасовано.

Confirm Subscription Cancellation

Your subscription has been canceled.


You can use your current plan until 2025-02-20. After that, the cloud capacity will be limited to 2 GB.
If the used space exceeds the limit, data will not be backed up, and functions such as Order and Share will not be available.

Close

5. Ваш план буде змінено на 2 GB Plan в день запланованої наступної оплати, і обсяг вашого хмарного сховища буде зменшено до 2 GB. Якщо обсяг хмарного сховища перевищено, резервне копіювання файлів не буде здійснюватися і функції «Замовлення» та «Поділитися» будуть недоступні.

Моя підписка

Переплянути детальну інформацію про вашу поточну підписку, скасувати та повторно оформити підписку можна в розділі «Моя підписка». Ви також можете змінити метод оплати, і його буде застосовано з наступної запланованої оплати.

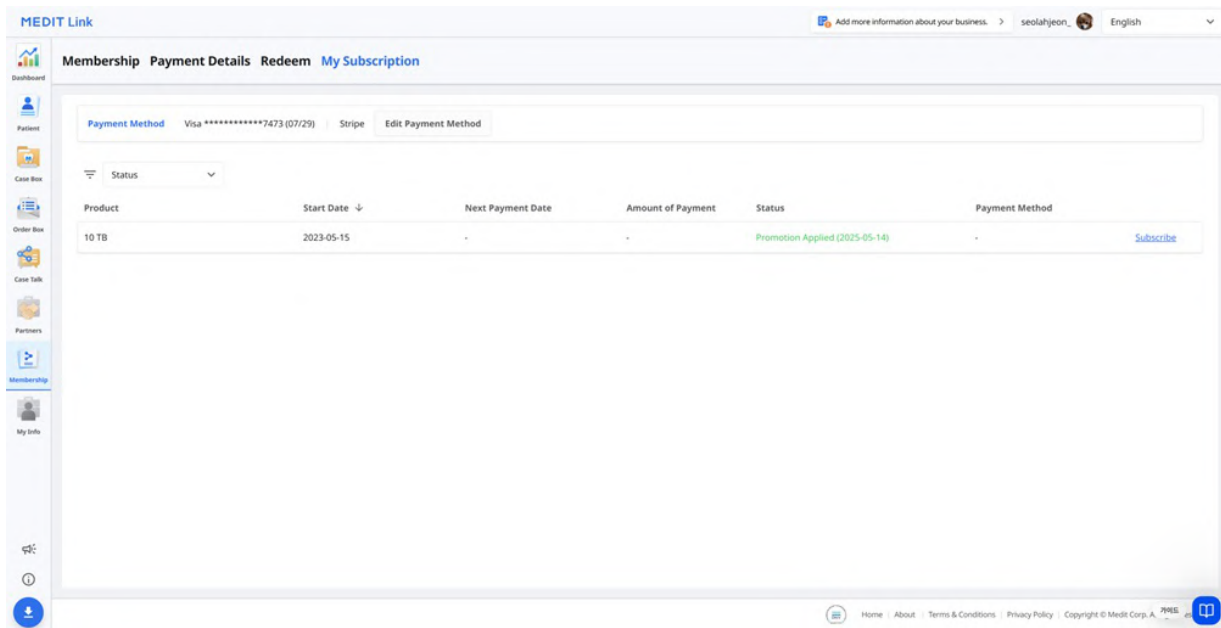

Деталі


Елемент	Опис
Продукт	Показує тип підписки.
Дата початку	Показує дату початку підписки або промоакції.
Дата наступної оплати	Показує дату наступної оплати.
Сума оплати	Показує суму оплати.
Статус	Підписка - Активна: підписка активна. - Строк дії закінчується: підписку не буде продовжено в дату наступної оплати, й вона буде скасована. - Строк дії закінчився: підписка завершилася. Промоакція - Промоакцію застосовано: промокод зараз активний. - Очікується застосування промоакції: очікується активація промокоду. - Строк дії промоакції закінчився: строк дії промокоду закінчився.
Метод оплати	Показує останні чотири цифри карти, яка використовується для оплати.

Повторна підписка


Елемент	Опис
Тарифний план хмарного сховища	Натисніть кнопку підписки, щоб повторно підписатися на тарифний план 10 TB Plan.
Тарифний план підписки на застосунок	Увійдіть до застосунку, щоб повторно оформити підписку.

Як додати метод оплати

1. Натисніть «Редагувати метод оплати».

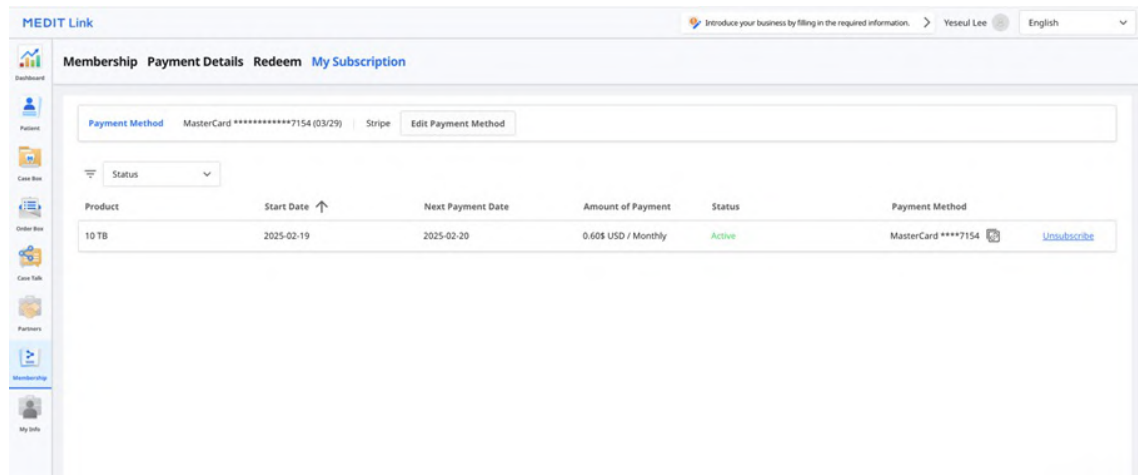

2. Натисніть «Додати метод оплати».

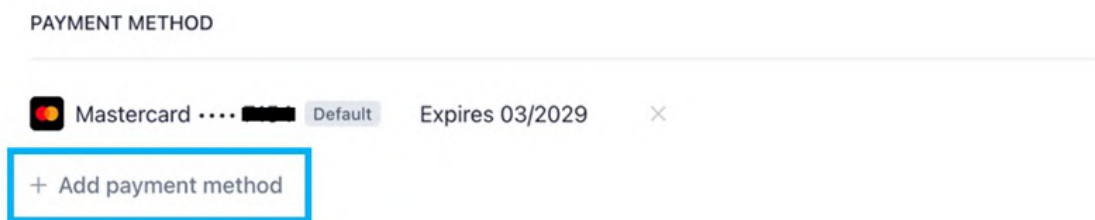

3. Введіть необхідну інформацію та натисніть «Додати».

Add payment method

Card number

1234 1234 1234 1234 

Expiration date MM / YY Security code CVC 

Country

South Korea 

By providing your card information, you allow Medit USA Inc to charge your card for future payments in accordance with their terms.

☒ Use as default payment method

Add

Go back

- Доданий метод оплати стане методом за замовчуванням і буде використаний для наступної оплати.

PAYMENT METHODS

	Visa •••• 4242	Default	Expires 04/2044	×
	Visa •••• 4242		Expires 05/2025	...

+ Add payment method

Як змінити метод оплати

- У діалоговому вікні виставлення рахунків натисніть значок випадного меню поряд з тим методом оплати, який потрібно змінити.

PAYMENT METHODS

	Visa •••• 4242	Default	Expires 04/2044	×
	Visa •••• 4242		Expires 05/2025	...

+ Add payment method

- Натисніть «Використовувати за замовчуванням», щоб встановити вибрану картку як метод оплати за замовчуванням.

CURRENT SUBSCRIPTION

[DEV] Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

\$9.99 per day

[View details](#) ▾

Your subscription renews on February 20, 2025.

PAYMENT METHODS

 Visa •••• 4242 Default

Expires 04/2044 ×

 Visa •••• 4242

Expires 05/2025 ...

+ Add payment method

Make default

Delete

Застосувати

Для отримання безплатного доступу до тарифного плану 10 TB Plan можна застосувати промокод.

Деталі

MEDIT Link

Add more information about your business. > seolah_jeon_dev_admin English ▾

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Membership

Payment Details

Redeem

My Subscription

Register Redeem Code

Register

Redeem Code

All ▾

	Product	Promotion	Code Number	Registration Date	From	To	Status	
4	Premium	4 Clinic Premium Promotion	2A6F-0125-6747-4A87	2022-03-16	2021-10-01	2021-10-05	Waiting	Cancel

< 1 >

Home

About

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp.


GUIDES



Елемент	Опис
Продукт	Показує тарифний план, до якого застосовується промоакція.
Промоакція	Показує назву промоакції.
Код	Показує код.
Дата реєстрації	Показує дату реєстрації коду.
З	Показує дату початку промоакції.
До	Показує дату закінчення строку дії промоакції.
Статус	- Registered: промокод доданий і тепер доступний. - Waiting: промокод очікує активації. - Activated: промокод активний. - Used:Строк дії промокоду закінчився.

Реєстрація промокоду

1. Введіть промокод і натисніть «Зареєструвати».
2. Прочитайте сповіщення та виберіть у спливному діалоговому вікні «Зареєструвати» або «Застосувати».
 - **Зареєструвати** — промокод буде зареєстровано. Ви зможете активувати та використати промокод пізніше після реєстрації.
 - **Застосувати** — промокод буде зареєстровано й активовано. Знижка за промокодом одразу почне діяти.

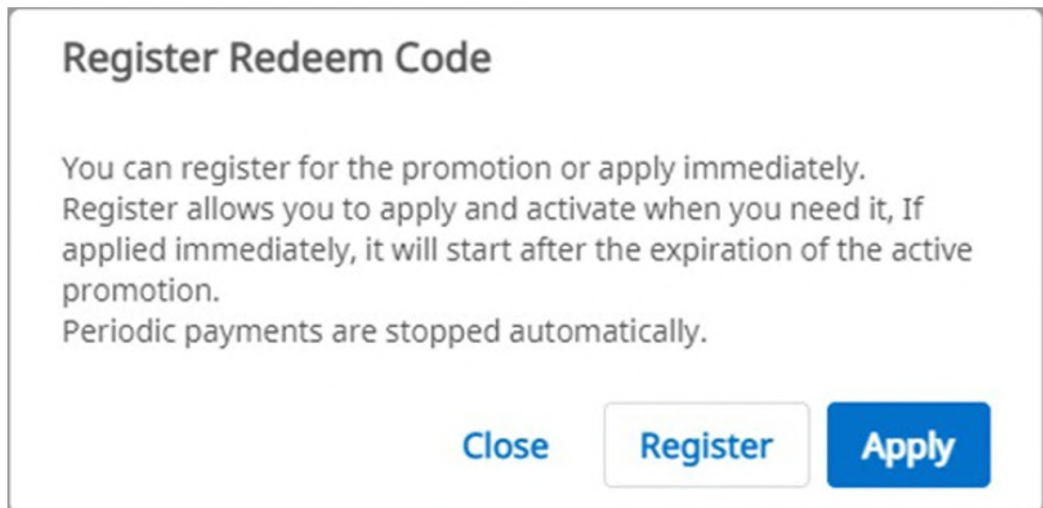

Активація промокоду

Ви можете зареєструвати декілька промокодів, але вам необхідно активувати той, який ви хочете використати.


1. Натисніть кнопку «Активувати» поряд із промокодом, який ви хочете використати.
 - Якщо промокод зі статусом «Activated» відсутній, вибраний вами промокод буде одразу застосовано.
 - Якщо є вже активований промокод, новий вибраний код отримає статус «Waiting». Коли мине термін дії активованого промокоду, буде активовано новий промокод зі статусом «Waiting».

Примітка

Лише один промокод можна активувати, лише один промокод може бути в статусі «Waiting».

Деталі оплати


Ви можете переглянути історію підписки та оплат на вкладці «Деталі оплати».

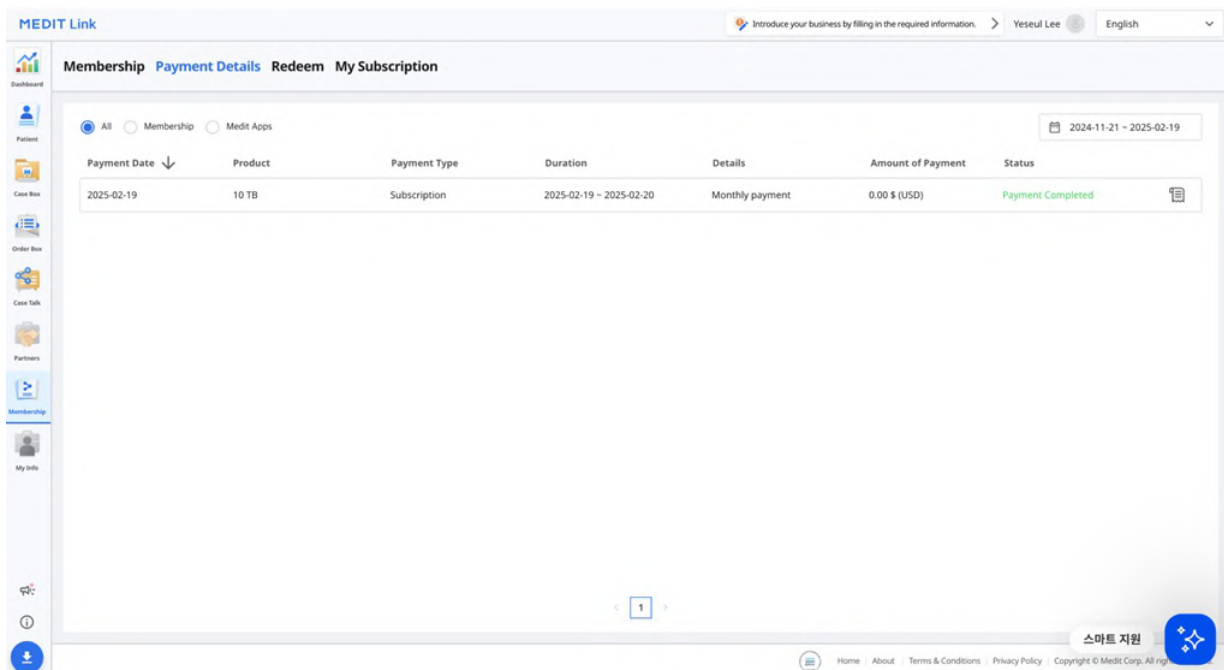


Елемент	Опис
Дата оплати	Показує дату оплати.
Продукт	Показує придбаний тарифний план або застосунок.
Тип оплати	Показує тип оплати: - Підписка - Одноразова оплата
Тривалість	Показує період підписки.
Деталі	Показує детальну інформацію про оплату.
Сума оплати	Показує суму оплати підписки або одноразової оплати.
Статус	- Payment Completed: оплату оброблено. - Payment Failed: оплату не оброблено. - Payment Incomplete: оплату не виконано. Натисніть «Оплатити зараз», щоб продовжити. - Waiting: очікується оплата для продовження підписки.

Перегляд деталей оплати

Ви можете переглядати рахунки та квитанції, натискаючи значок квитанції праворуч.

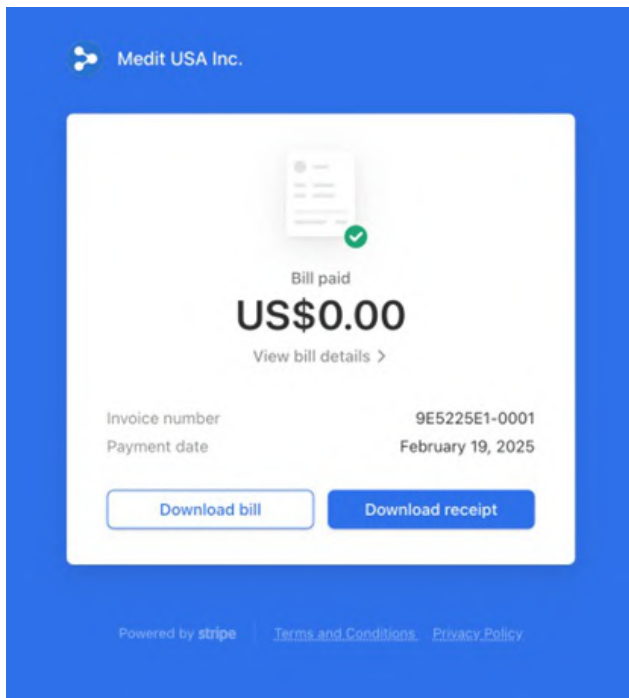

Натисніть «Деталі оплати», щоб переглянути інформацію про оплату.

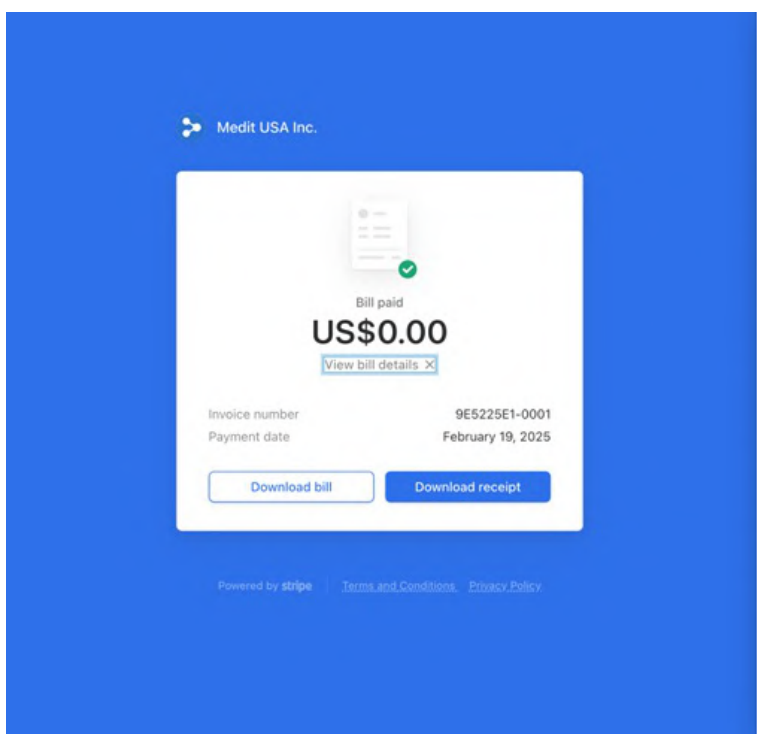

[X](#) Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target	yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source	Medit USA Inc.
bill	#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025	
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	US\$0.60
Quantity 1 piece	
subtotal	US\$0.60
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)	
	-US\$0.60
Payment amount	US\$0.00
Amount paid	US\$0.00
Remaining amount	US\$0.00

Do you have any questions?[Contact Medit USA Inc.](#)

My Info

Мій обліковий запис

У розділі My Info ви можете переглянути та відредагувати введену під час реєстрації інформацію, а також дізнатися свій тарифний план.

← → ↺ 🌐 www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info

My Account My Clinic My Scanner

**Account Information**

Email Address

seolah.jeon@medit.com

Change Email Address

Password

Change Password

Name

seolah.jeon_dev_admin

Language

English

Country/Region

Korea, Republic of

i Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Моя клініка/Моя лабораторія (лише для облікового запису адміністратора)

Тут ви можете переглянути та відредагувати інформацію про свою клініку або лабораторію. Цей розділ доступний лише для облікових записів адміністраторів.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info


My Account **My Clinic** **My Scanner**

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

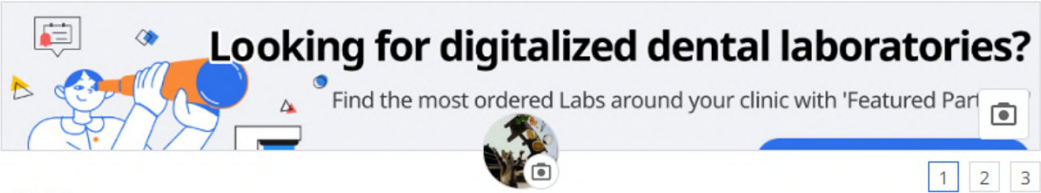

Looking for digitalized dental laboratories?
Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'

1

2

3

Services

Select

▼

Specialties (choose up to 3)

Select

▼

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Мій сканер

Тут ви можете переглянути інформацію про під'єднані пристрої для облікового запису.

Інші елементи меню

Сповіщення й оновлення

Тут ви можете переглядати важливі сповіщення від Medit та інформацію про оновлення програмного забезпечення Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Пов'язані вебсайти

Тут ви можете отримати різноманітну інформацію про використання Medit Link. Отримайте доступ до освітніх та інформаційних ресурсів Medit, таких як Medit Academy, канал Medit Academy на YouTube та Довідковий центр Medit.

63

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

Завантаження застосунку Medit Link

Тут ви можете завантажити останню версію інсталятора програми з інтернету. Це може стати в пригоді, якщо ви загубили інсталятор, наданий в комплекті з продуктом, або ваш інсталятор застарілий.

Примітка

Якщо у вас є з'єднання з інтернетом, Medit Link оновлюється автоматично.

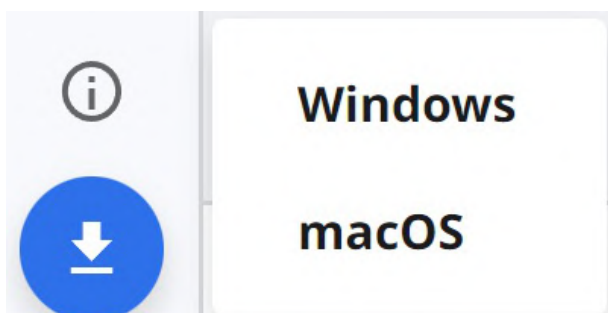

Огляд

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Рядок заголовка	Детальну інформацію див. в розділі Застосунок Medit Link > Рядок заголовка .
2	Меню	Детальну інформацію див. в розділі Застосунок Medit Link > Меню .
3	Інструменти й функції	Детальну інформацію див. в розділах Застосунок Medit Link > Переглядач файлів та Застосунок Medit Link > Опції перегляду .
4	Перелік проєктів	Детальну інформацію див. в розділі Застосунок Medit Link > Фільтрування й пошук .

У наведеній нижче таблиці показано, які розділи меню доступні для кожного типу облікового запису клініки та лабораторії.

Тип облікового запису		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Обліковий запис клініки	Адміністратор	O	O	O	X	X	O	O	O
	Користувач	O	O	O	X	X	O	O * Лише функція відновлення	O
Обліковий запис лабораторії	Адміністратор	X	X	X	O	O	O	O	O
	Користувач	X	X	X	O	O	O	O * Лише функція відновлення	O

Рядок заголовка

Рядок заголовка забезпечує швидкий доступ до таких розділів, як інформація облікового запису, сповіщення, сповіщення й оновлення, параметри та статус мережі.



Моя інформація

Розділ «Моя інформація» містить основну інформацію про користувача, таку як зображення профілю, назва клініки або лабораторії, адреса електронної пошти та ім'я користувача.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name


Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Сповіщення

У цьому розділі можна побачити сповіщення, пов'язані з партнерствами, замовленнями та робочими процесами.

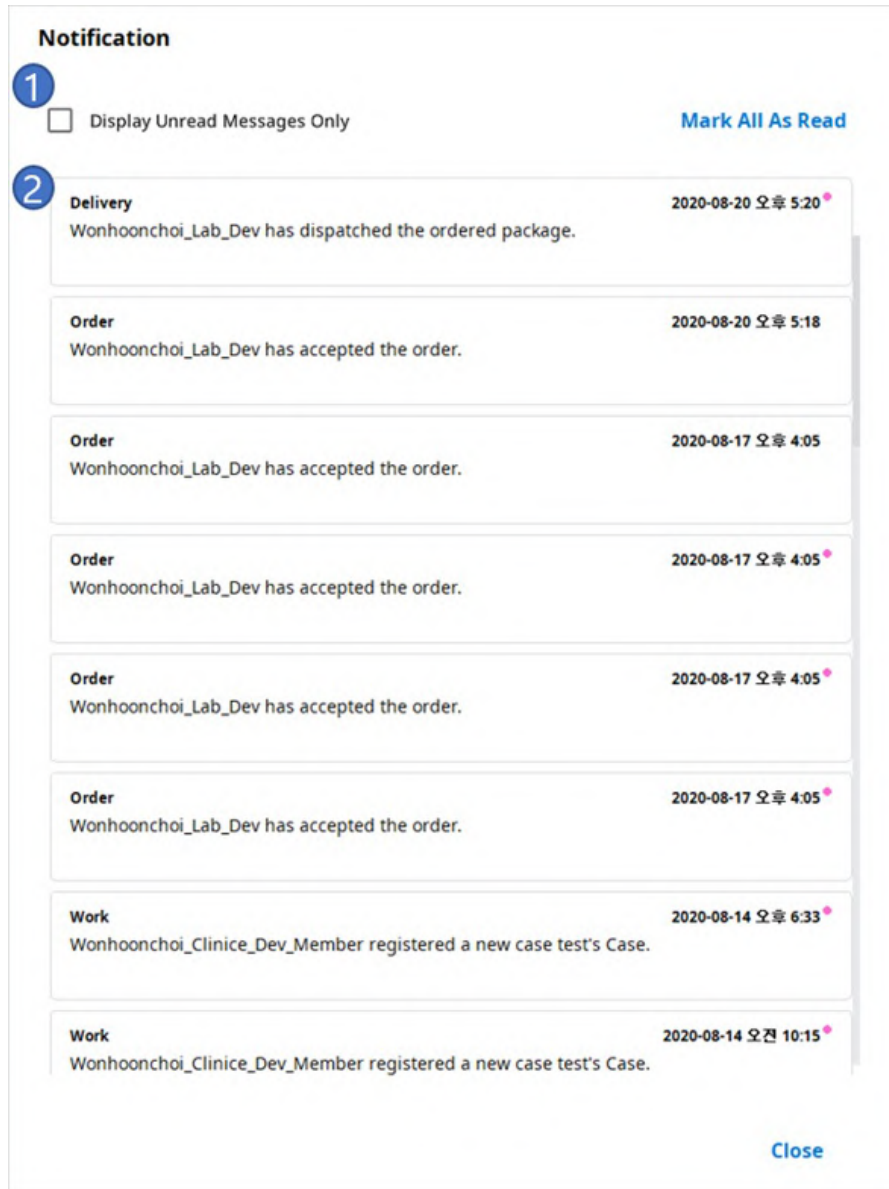


1	Встановіть прапорець, щоб показувати лише непрочитані повідомлення.
2	Клацніть сповіщення, щоб одразу перейти до пов'язаного проєкту або вебсторінки.

Сповіщення й оновлення

Тут ви можете переглядати важливі сповіщення від Medit та інформацію про оновлення програмного забезпечення Medit.

Параметри

Діалогове вікно параметрів дозволяє користувачам налаштувати програму.

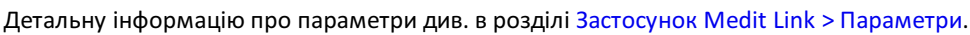

Значок статусу мережі в рядку заголовка дозволяє перевіряти статус мережі в реальному часі.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Якщо з'єднання з мережею погане, можуть виникнути такі обмеження:

- Обмеження деяких функцій, таких як замовлення проєкту, створення проєкту, надання спільного доступу через Case Talk і хмарна синхронізація.
- Загальна продуктивність сервісу може бути знижена через вплив мережного середовища.

У цьому випадку ви можете перейти в автономний режим для виконання базових задач, а потім, після під'єднання до мережі, використати функції, які вимагають інтернет-з'єднання.

Примітка

Символ мережі вказує на швидкість відгуку між поточною зоною та AWS (Amazon Web Services). Він не показує швидкість вашої мережі. Іноді він може показувати незадовільний статус, навіть якщо швидкість мережі достатньо висока.

Якщо для інших процесів використовується та сама мережа, швидкість мережі може бути низькою, і загальна продуктивність Medit Link також може бути знижена. У цьому випадку не слід давати іншим процесам використовувати мережу.

Наприклад, функція «Передавати необроблені дані» займає значну частину ресурсів мережі. Якщо значок показує незадовільний статус, перейдіть до розділу Параметри > Передавати необроблені дані та вимкніть опцію «Передавати автоматично».

Параметри

Загальні

Це параметри для загального налаштування системи.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI

☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

Папка для збереження	Вкажіть папку для збереження результатів, створених у Medit Link та під'єднаних програмах.	
Папка для встановлення застосунків	Вкажіть шлях встановлення застосунків Medit Apps і партнерських застосунків, доступних в App Box.	
Мовні параметри	Виберіть мову програми.	
Маркування зубів	Виберіть систему маркування зубів: FDI або US.	
Сповіщення	Якщо відмічено, ви будете отримувати сповіщення про оновлення програми.	
Передавати необроблені дані	Якщо відмічено, необроблені дані будуть автоматично передаватися до хмари. Це допомагає створювати резервні копії оригінальних даних та виконувати безперешкодне сканування у разі використання Medit Link із тим же обліковим записом на іншому ПК. Резервне копіювання оригінальних даних до хмари застосовується лише до даних, отриманих в Medit Scan for Clinics.	
Швидке сканування	Виберіть, чи хочете ви, щоб наведені нижче етапи сканування автоматично показувалися в Medit Scan for Clinics без заповнення інформації форми. • Передопераційна верхня щелепа • Передопераційна нижня щелепа • Сканування обличчя	
Опції перегляду	Розширений рендеринг	Коли відмічено, 3D-модель показується більш яскравою та реалістичною.
	Регулювання яскравості	Регулювання яскравості 3D-моделі. * Коли ви відкриєте ті ж самі дані за допомогою іншого програмного забезпечення, кольори можуть трохи відрізнитися від кольорів у Medit Link.
Програма покращення користувацького досвіду Medit	Візьміть участь у програмі покращення користувацького досвіду Medit. • Ми використовуємо зібрану інформацію для покращення наших продуктів та послуг. • Ми не збираємо ніяку інформацію, за допомогою якою можна б було ідентифікувати окремих осіб.	
Сторінка за замовчуванням після входу до системи	Виберіть розділ, який буде показано за замовчуванням після запуску програми. • Для облікового запису клініки можна вибрати Patient або Case Box. • Для облікового запису лабораторії можна вибрати In Box або Work Box.	

Керування сховищем

Ви можете переглядати доступний обсяг локального та хмарного сховищ і керувати ним.

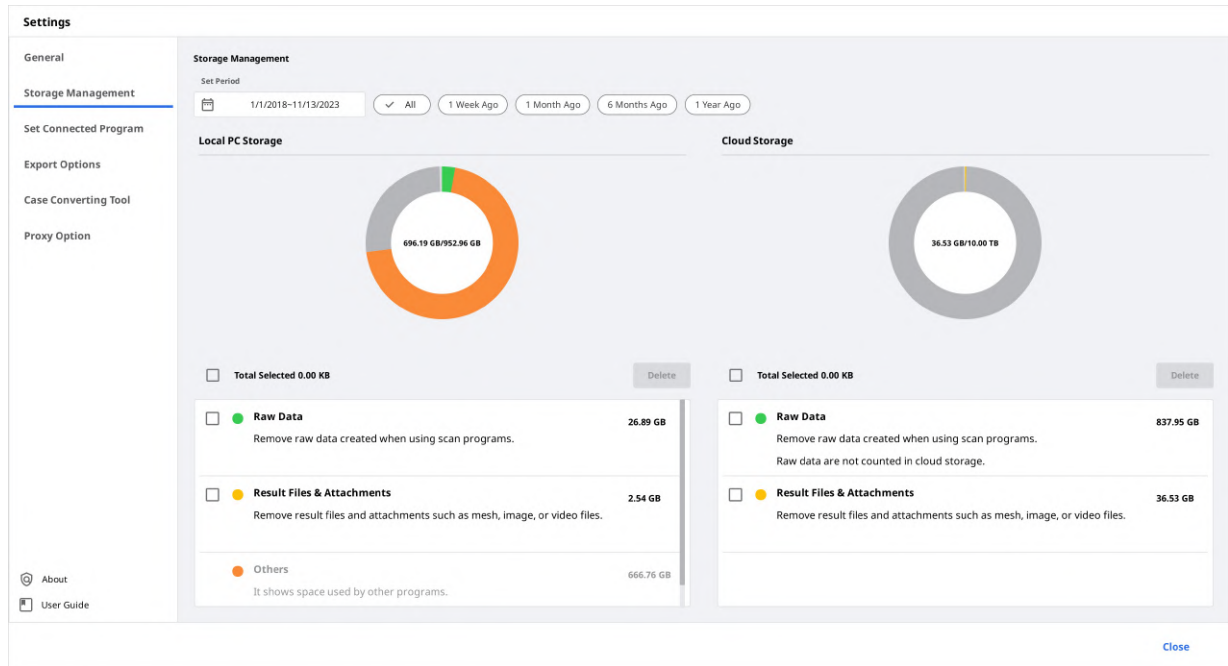

Задати період

Задайте період, щоб видалити дані, створені протягом цього періоду.

- Усі — буде показано всі файли.
- 1 тиждень тому — буде показано всі файли, з моменту створення яких пройшов тиждень.
- 1 місяць тому — буде показано всі файли, з моменту створення яких пройшов місяць.
- 6 місяців тому — буде показано всі файли, з моменту створення яких пройшло шість місяців.
- 1 рік тому — буде показано всі файли, з моменту створення яких пройшов рік.

Локальне сховище

Керуйте обсягом сховища на ПК.

Необроблені дані	Дозволяє видалити вибрані необроблені дані з ПК. Якщо необроблені дані вже передані до хмари, ви можете в будь-який час завантажити та використати їх.
Результати й вкладення	Дозволяє видалити з ПК файли результатів і вкладень, такі як mesh-файли, зображення та відео. Якщо ці файли вже передано до хмари, ви можете в будь-який час завантажити та використати їх.
Інші	Показує файли, які використовуються для роботи системи й інших програм. Ви можете подивитися обсяг сховища, який займають ці файли. Ви не можете видалити ці файли з Medit Link.
Видалити	Видаляє вибрані файли з ПК.


Хмарне сховище

Керуйте обсягом хмарного сховища.

Необроблені дані	Необроблені дані не займають місце у хмарному сховищі, тому їх немає на круговій діаграмі. Однак за потреби звідси можна керувати необробленими даними, наприклад видалити їх для захисту особистої інформації пацієнта тощо.
Результати й вкладення	Файли результатів та вкладення займають місце у хмарному сховищі. Якщо воно заповнене, ви можете вивільнити місце, видаливши непотрібні файли.
Купити місце в сховищі	Якщо ви використовуєте тарифний план 2 GB Plan, то можете підписатися на тарифний план 10 TB Plan, щоб збільшити обсяг хмарного сховища.
Видалити	Видаляє вибрані файли з хмарного сховища, щоб звільнити місце.

Налаштувати під'єднані програми

Керуйте програмами, які підтримують інтеграцію з Medit Link.

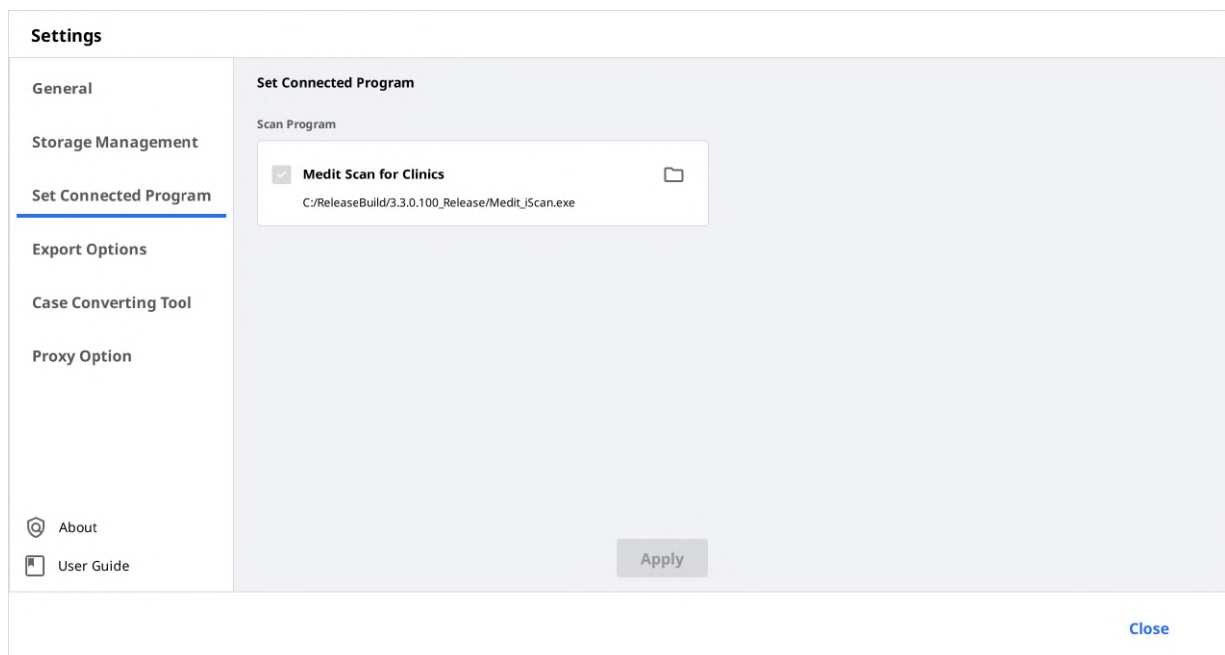

Ви можете встановити такі програми:

	Обліковий запис клініки	Обліковий запис лабораторії
Програма сканування	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

Примітка

В Medit Link на macOS недоступні такі програми:

- [Medit Scan for Labs](#)

Опції експорту

Налаштуйте спосіб експорту файлів із Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name


Apply

Close

Тип	Виберіть програму CAD, яку хочете використовувати для проектування. Програма автоматично налаштуватиме результати відповідно до вашого вибору, що дозволить вам розпочинати проектування без додаткового вирівнювання по осях.
Експорт файлів до	Вкажіть шлях для збереження результатів.
Mesh-формат	Вкажіть формат фінального mesh-файлу.
Формат зображення	Вкажіть формат файлів зображень, що експортуються.
Стиснути й об'єднати	Стиснути файли — всі результати будуть стиснуті в один файл. Об'єднати mesh-дані під час експорту — об'єднайте всі результати для верхньої або нижньої щелепи в один файл. Якщо ви використовуєте програми, до яких не можна імпортувати більше одного файлу, то можете об'єднати файли в один для роботи в цих програмах.
Опції, якщо така папка або файл вже існують	Виберіть дію за замовчуванням для випадків, якщо папка або файл з таким ім'ям вже існують в цільовій папці. - Завжди запитувати під час експорту. - Експортувати новий файл та перезаписати наявні файли. Збережений файл буде втрачено. - Створити папку й експортувати файли.
Правило іменування папок	Задайте правила іменування папок під час експорту файлів. Задані правила будуть застосовані до іменування папки, і експортований файл буде збережено в створеній папці. Для встановлення правила можна скористатися наведеною нижче інформацією. - Обліковий запис клініки Дата створення проекту, дата сканування, дата замовлення, ім'я пацієнта, назва проекту, назва партнера, ідентифікатор пацієнта, ідентифікатор замовлення - Обліковий запис лабораторії Дата створення проекту, дата сканування, дата замовлення, ім'я пацієнта, назва проекту, назва партнера, ідентифікатор замовлення
Правило іменування файлів	Задайте правила іменування файлу, що експортується. Для встановлення правила можна скористатися наведеною нижче інформацією. - Обліковий запис клініки Дата створення проекту, дата сканування, дата замовлення, ім'я пацієнта, назва проекту, назва партнера, ідентифікатор пацієнта, ідентифікатор замовлення - Обліковий запис лабораторії Дата створення проекту, дата сканування, дата замовлення, ім'я пацієнта, назва проекту, назва партнера, ідентифікатор замовлення

Інструмент конвертації проектів


Ви можете переміщувати проекти між різними обліковими записами, експортуючи наявні проекти облікового запису або імпортуючи проекти, експортовані з інших облікових записів.

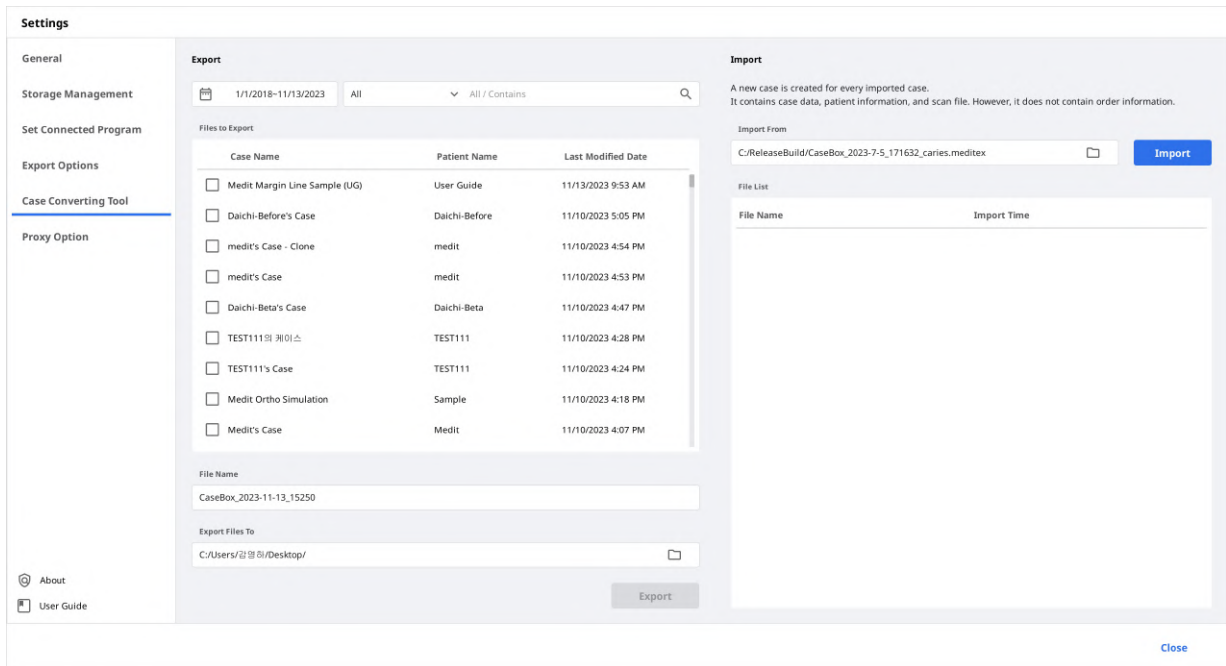


Експорт проекту

Експортуйте проекти з поточного облікового запису на локальний комп'ютер.

1. Відкрийте Medit Link і натисніть значок «Параметри».

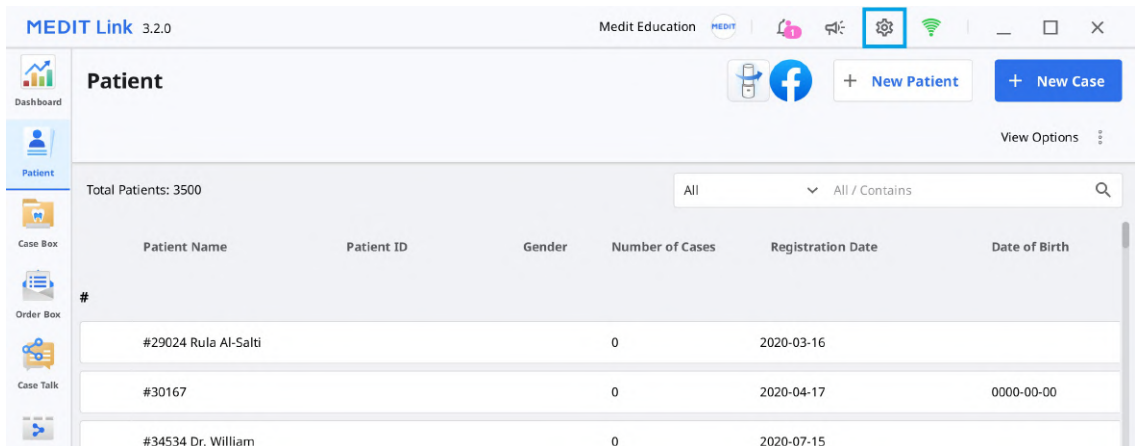

2. Виберіть розділ «Інструмент конвертації проектів» в меню ліворуч.

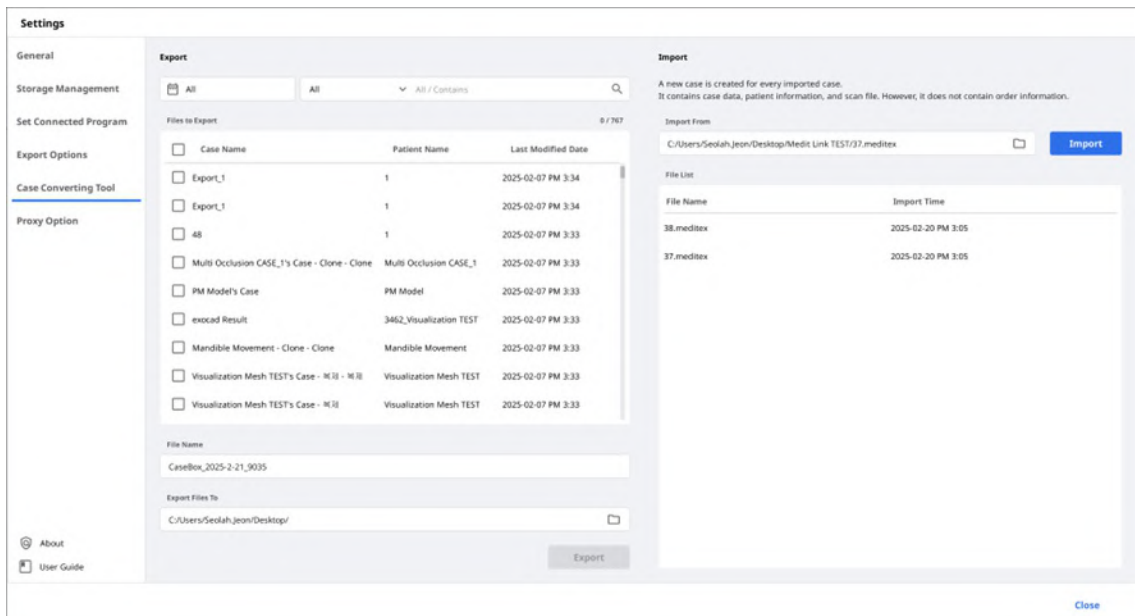

3. У розділі «Експорт» задайте період або за необхідності виконайте пошук проєктів для експорту.

Patient Name	Last Modified Date
	2025-02-07 PM 3:34
	2025-02-07 PM 3:34

4. У розділі «Файли для експорту» виберіть з переліку проєкти, які потрібно експортувати.

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34
☒ Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34

5. Задайте ім'я файлу, відредагувавши назву проєкту в полі «Ім'я файлу».
6. Задайте папку призначення для експорту вибраних проєктів.
7. Натисніть «Експорт».
8. Натисніть «Так», щоб відкрити папку, до якої експортовано файл.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. Експортовані проєкти буде збережено в форматі .meditex.

Імпорт проєкту

1. Відкрийте Medit Link і натисніть значок «Параметри».

MEDIT Link 3.2.0 Medit Education

Patient

Total Patients: 3500

All / Contains

#	Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
	#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
	#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
	#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

- Виберіть розділ «Інструмент конвертації проєктів» в меню ліворуч.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

All / Contains

Files to Export 0 / 767

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34
☐ Export_1	1	2025-02-07 PM 3:34
☐ 48	1	2025-02-07 PM 3:33
☐ Multi Occlusion CASE_1's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion CASE_1	2025-02-07 PM 3:33
☐ PM Model's Case	PM Model	2025-02-07 PM 3:33
☐ exocad Result	3462_Visualization TEST	2025-02-07 PM 3:33
☐ Mandible Movement - Clone - Clone	Mandible Movement	2025-02-07 PM 3:33
☐ Visualization Mesh TEST's Case - WII - WII	Visualization Mesh TEST	2025-02-07 PM 3:33
☐ Visualization Mesh TEST's Case - WII	Visualization Mesh TEST	2025-02-07 PM 3:33

File Name

CaseBox_2025-2-21_9035

Export Files To

C:/Users/Seolah.Jeon/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/Users/Seolah.Jeon/Desktop/Medit Link TEST/37.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
38.meditex	2025-02-20 PM 3:05
37.meditex	2025-02-20 PM 3:05

Close

- У розділі «Імпорт» натисніть значок папки, щоб знайти на ПК файл .meditex, який потрібно імпортувати.

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

- Натисніть кнопку «Імпорт» та відмітьте файли для імпорту в переліку нижче.

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex 

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

5. Імпортований проєкт також з'явиться у вашому Case Box (обліковий запис клініки) або Work Box (обліковий запис лабораторії).

Параметри проксі-сервера

У деяких обмежених мережних середовищах можна змінити параметри мережі.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

Інформація

Тут показується детальна інформація про Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name	Medit Link
Version	3.3.0
Build Number	123
Server	Operation Korea
UDI DI	(01)8800026700449
UDI PI	(10)3.3.0

Medit Corp.

품목명	1등급 치과 영상 전송장치소프트웨어
모델명	ML-STD001
품목별제조신고번호	제신 25-112호
사용방법 및 사용시 주의 사항	사용설명서 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
제조자의 상호:	(주)메디트
제조자의 주소:	서울특별시 영등포구 양평로 25길 8 9층, 10층
제조자의 연락처:	+82-2-2193-9600

본 제품은 「디지털의료기기소프트웨어」임

 2025.03

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)

☐ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Посібник користувача


Отримайте посібник користувача для Medit Link.

Щоб відкрити посібник користувача, потрібно з'єднання з інтернетом.

Меню

Dashboard

Як у застосунку, так і у вебсервісі Medit Link можна переглядати статистику всієї роботи, виконаної в Medit Link, на графіках і діаграмах.

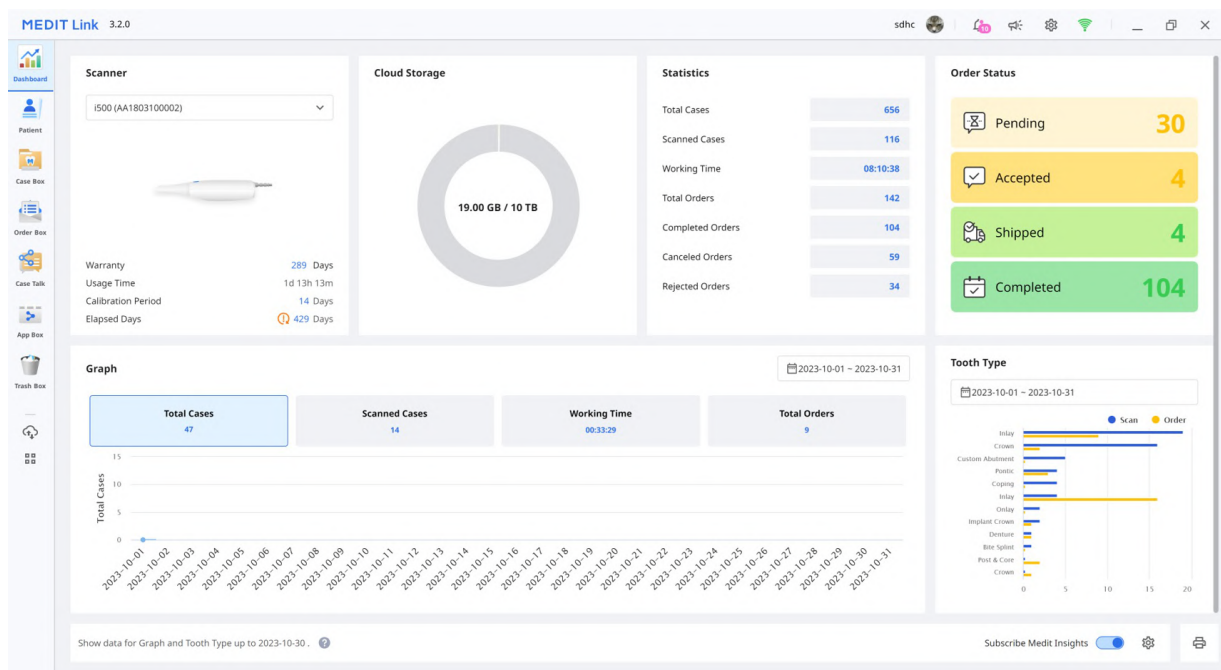


Примітка

Додаткову інформацію про Dashboard і Medit Insights див. в розділі [Вебсервіс Medit Link > Dashboard](#).

Patient


У меню Patient можна додавати, редагувати, видаляти та об'єднувати дані пацієнтів.

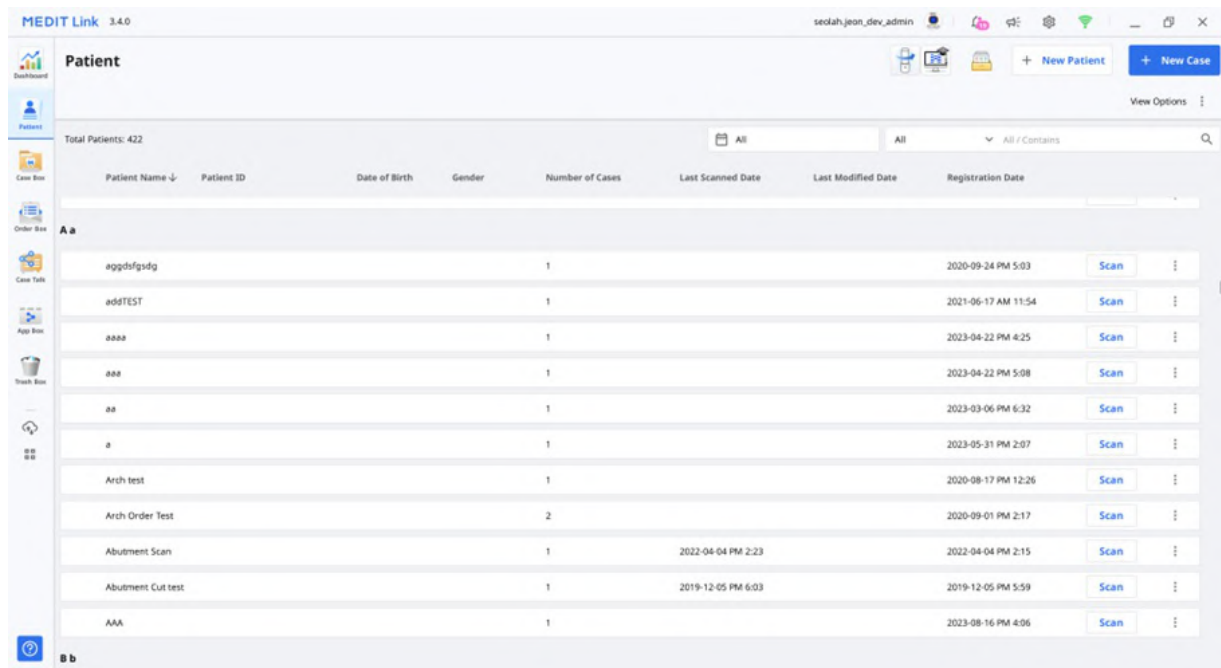

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number of Cases	Last Scanned Date	Last Modified Date	Registration Date
aggsdgsdg				1			2020-09-24 PM 5:03
addTEST				1			2021-06-17 AM 11:54
aaaa				1			2023-04-22 PM 4:25
aaa				1			2023-04-22 PM 5:08
aa				1			2023-03-06 PM 6:32
a				1			2023-05-31 PM 2:07
Arch test				1			2020-08-17 PM 12:26
Arch Order Test				2			2020-09-01 PM 2:17
Abutment Scan				1	2022-04-04 PM 2:23		2022-04-04 PM 2:15
Abutment Cut test				1	2019-12-05 PM 6:03		2019-12-05 PM 5:59
AAA				1			2023-08-16 PM 4:06

Додавання нового пацієнта

1. Натисніть «Новий пацієнт».

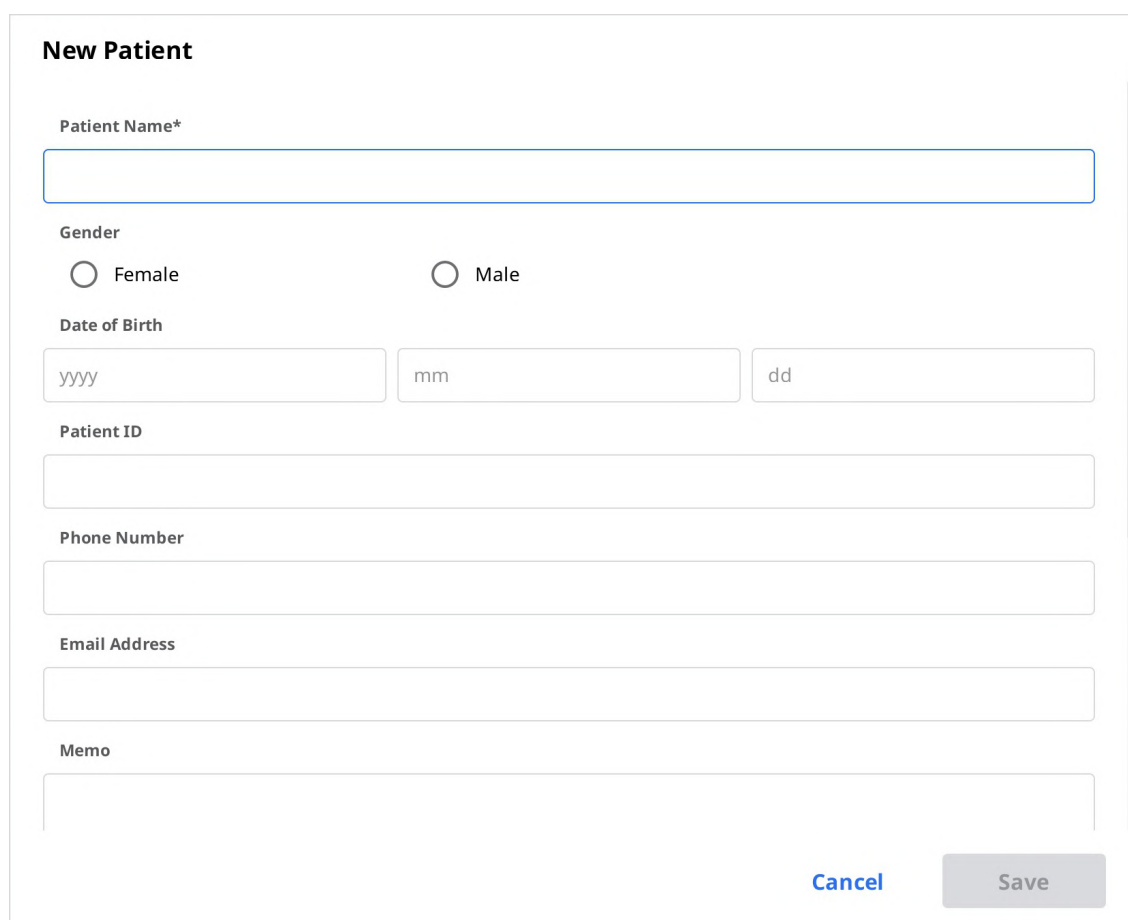

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save


2. Введіть необхідну інформацію у діалоговому вікні «Новий пацієнт» та натисніть «Зберегти».

Видалення пацієнта

Примітка

Пацієнта можна видалити тільки тоді, коли у нього немає проєктів.

1. Виберіть пацієнта, якого треба видалити, в переліку.

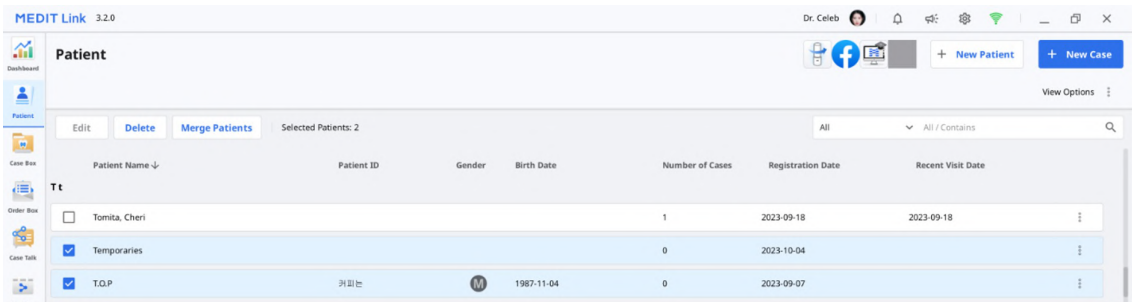


2. Натисніть «Видалити».

Об'єднання пацієнтів

Ви можете об'єднати всі проєкти декількох пацієнтів під одним пацієнтом.

1. Виберіть пацієнтів, яких треба об'єднати, в переліку.

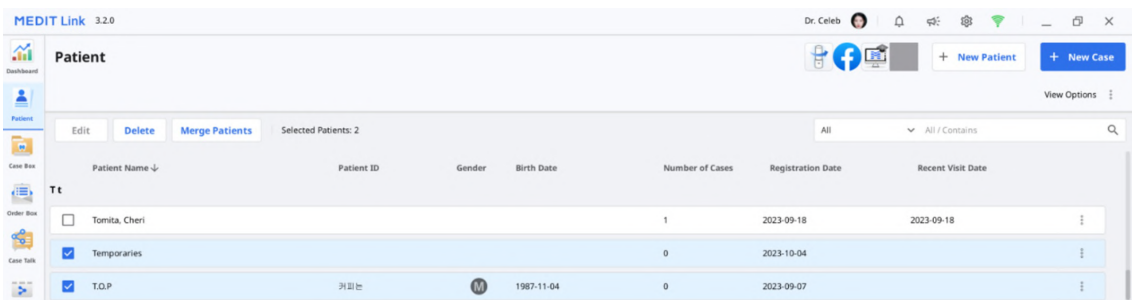

2. Натисніть «Об'єднати пацієнтів».
3. Виберіть цільового пацієнта, під яким ви хочете об'єднати всі проєкти.
4. Всі проєкти буде об'єднано під цільовим пацієнтом, а інформацію цільового пацієнта буде збережено.

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

[Cancel](#) [Apply](#)

5. Натисніть «Застосувати», щоб завершити об'єднання.

Case Box/Work Box

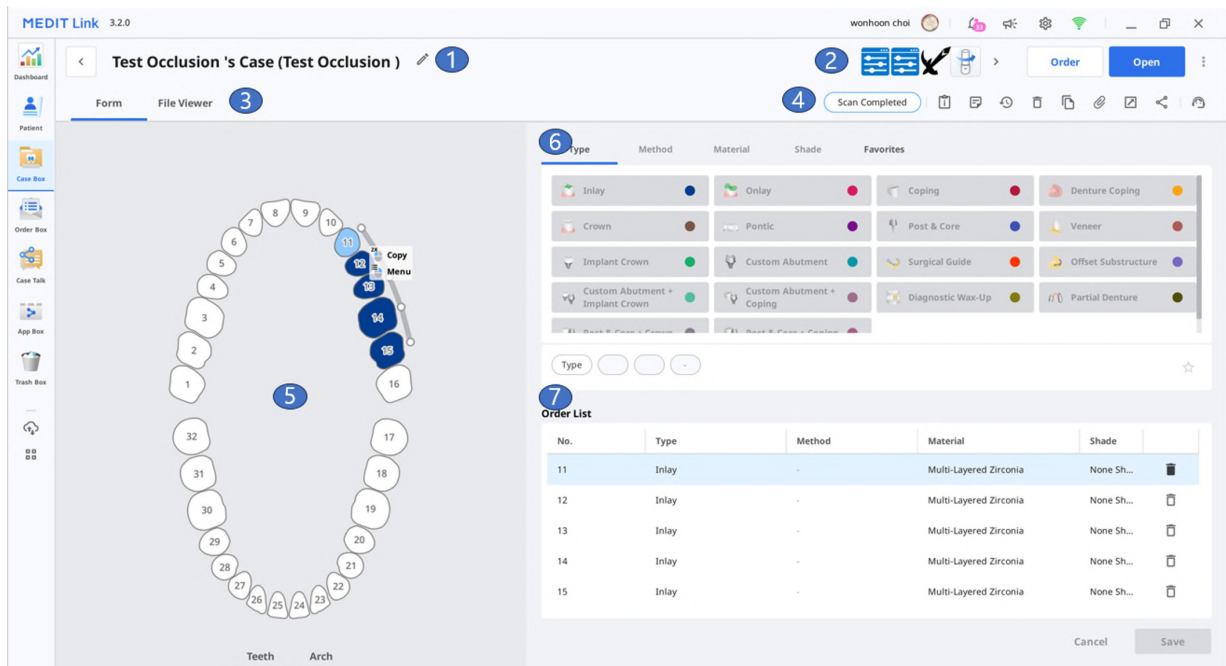

1	Назва проєкту та ім'я пацієнта.
2	Основні функції: кнопка «Сканувати» або «Відкрити», кнопка «Замовлення», значки застосунків.
3	Доступні вкладки: «Форма», «Переглядач файлів».
4	Функції для керування проєктами та файлами.
5	Інтерфейс реєстрації форми для вибраної програми сканування.
6	Вибір типу/методу/матеріалу/відтінку для вибраного номера зуба.
7	Інформація про тип/метод/матеріал/відтінок для вибраних зубів.

Вкладки в Case Box/Work Box

Форма	Переглядач файлів
Вкладка «Форма» надає інтерфейс для введення основної інформації для сканування, такої як тип, метод і матеріал для номерів зубів, а також параметрів сканування. Введена вами інформація передається до під'єднаної програми сканування та використовується як інформація про замовлення під час розміщення замовлення у вашого партнера.	Перегляд файлів результатів, створених програмами сканування та CAD. Переглядач файлів дозволяє переглядати отримані та прикріплені 3D-моделі та 2D-зображення, а також керувати ними.

Функції в Case Box/Work Box

В Case Box/Work Box надаються такі функції:

	Статус проекту	Показує статус проекту.								
	Перейти до Order Box/In Box	Дозволяє перейти до проекту в іншому Box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).								
	Інформація про проект	Дозволяє переглянути деталі проекту, зберегти їх як PDF-файл або надрукувати.								
	Примітка й теги	Дозволяє додати примітку або теги під час реєстрації або замовлення проекту. Використовуйте їх для передавання партнерам будь-якої додаткової або допоміжної інформації про проект.								
	Історія проекту	Показує детальну історію проекту. History <table><tr><td>Last Modified Date</td><td>3/29/2022 1:57 PM</td></tr><tr><td>Scanning Date</td><td>4/12/2021 2:06 PM</td></tr><tr><td>Creation Date</td><td>3/22/2022 1:17 PM</td></tr></table> <table><tr><td>Case Size</td><td>435MB</td></tr></table> Close	Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM	Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM	Creation Date	3/22/2022 1:17 PM	Case Size	435MB
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM									
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM									
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM									
Case Size	435MB									
	Видалити	Видаляє проект. Не можна видаляти замовлені проекти та проекти, створені в автономному режимі.								
	Клонувати	Створює дублікат поточного проекту в Case Box. Всі дані будуть скопійовані до клонованого проекту. Ця функція допомагає реплікувати інформацію про лікування для того ж пацієнта або зробити додаткове замовлення з тією ж інформацією або файлами.								
	Прикріпити	Дозволяє прикріпити файли різноманітних форматів.								
	Експорт	Дозволяє експортувати файли результатів сканування або CAD на локальний ПК. Під час експорту файлів можна вибрати бажаний формат. Експортовані файли можуть бути використані у CAD- та CAM-програмах для подальшої роботи.								
	Поділитися	Дозволяє створити посилання для спільного доступу. Користувачі з цим посиланням можуть отримати доступ до 3D-даних у браузері, наприклад Chrome, Firefox або Safari, без встановлення додаткових програм. Ви можете надати це посилання всім або конкретним людям. Для убезпечення особистої інформації можна задати PIN-код або дату закінчення строку дії посилання.								
	Надіслати запит до служби підтримки	Переносить користувача на сторінку Довідкового центру Medit для надсилання запиту до служби підтримки.								

Order Box/In Box

Order | **File Viewer**

Order ID: 5996137

Patient Name: Occlusion Test | Partner Name: WonhoonChoi_Lab_Stage

Scan Date: 2023-04-20 08:15 | Order Date: 2023-04-20 08:15

Requested Delivery Date: 2023-04-27 | Expected Delivery Date: 2023-04-27

Memo:

Tags:

Type	Method	Material	Shade
11 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
12 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
13 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
14 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

1	Назва проекту та ім'я пацієнта.
2	Функції для керування замовленням (прийняття/скасування, доставлення/отримання).
3	Доступні вкладки: «Замовлення», «Переглядач файлів».
4	Функції для керування проектами та файлами: статус проекту, ярлики для детальної інформації, інформація про проект, примітка та теги тощо.
5	Детальна інформація щодо замовлення, включно з ідентифікатором замовлення, ім'ям пацієнта, назвою партнера, датою сканування, датою замовлення, датою доставлення, а також приміткою та тегами.
6	Інформація про замовлений продукт і статус замовлення.

Вкладки в Order Box/In Box

Замовлення	Переглядач файлів
Детальна інформація щодо замовлення, включно з ідентифікатором замовлення, ім'ям пацієнта, назвою партнера, датою сканування, датою замовлення, датою доставлення, а також приміткою та тегами.	Перегляд файлів, створених програмами сканування/CAD. Переглядач файлів дозволяє переглядати отримані або прикріплені 3D-моделі та 2D-зображення й керувати ними.

Case Talk

Проектами, створеними в Medit Link, можна поділитися з вказаними людьми, всіма, хто має посилання для спільного доступу, або зареєстрованими користувачами Medit Link.

Ви можете переглянути перелік проектів зі спільним доступом в розділі Case Talk в застосунку Medit Link і вебсервісі Medit Link.

Примітка

Для використання Case Talk потрібне інтернет-з'єднання.

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolahjeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2.***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

Проекти зі спільним доступом можна переглядати через веббраузер, не встановлюючи для цього окрему програму. Це дозволяє легко обмінюватися 3D-даними на різних пристроях.

App Box

App Box містить різні застосунки, які поліпшують основний робочий процес сканування та підвищують продуктивність. Ви можете завантажити та встановити запропоновані застосунки для створення стоматологічних апаратів, аналізу даних сканування, допомоги під час консультації або оптимізації робочого процесу.

Featured Apps

- Medit DCM Converter**: Convert 3Shape DCM files to Medit-compatible format. [Update]
- Medit Smile Design**: Simulation of teeth movement for orthodontic cases. [Installed]
- Medit Ortho Simulation**: Simulate the trajectory of teeth movement using Medit Ortho... [Install]
- Action Gate (ヨシダ・Yoshida)**: Comprehensive dental PMS. [Install]

Management

- DentWeb Integration**: Comprehensive dental PMS. [Install]
- EasyRx Integration**: Universal orthodontic LMS. [Install]
- Open Dental Integration**: Quality software for dental offices. [Install]
- iie systems connector**: PRM specialized for orthodontics. [Install]
- OneClick Integration App**: Osstem's easy-to-use PMS. [Install]
- i-Pro Integration**: Comprehensive dental PMS.
- LOGOSw Integration**: Add a link between LOGOSw and Medit Link.
- DentalCAD Integration**: Allow to integrate Medit Link with DentalCAD.
- Action Gate (ヨシダ・Yoshida)**: Comprehensive dental PMS.
- Andcom Integration**: Convenient dental PMS.

Uci


На вкладці «Uci» показано перелік усіх застосунків, включно з розробленими Medit оригінальними застосунками (Medit Apps) та партнерськими застосунками, які є застосунками для інтеграції з партнерами Medit із різноманітних галузей стоматології, таких як 3D-друк, програмне забезпечення CAD/CAM тощо.

Medit Apps

На вкладці Medit Apps показується виключно перелік застосунків, розроблених Medit.

Завантажені

На вкладці «Завантажені» показується перелік встановлених на комп'ютері застосунків, а також застосунків, які раніше були завантажені під обліковим записом користувача.

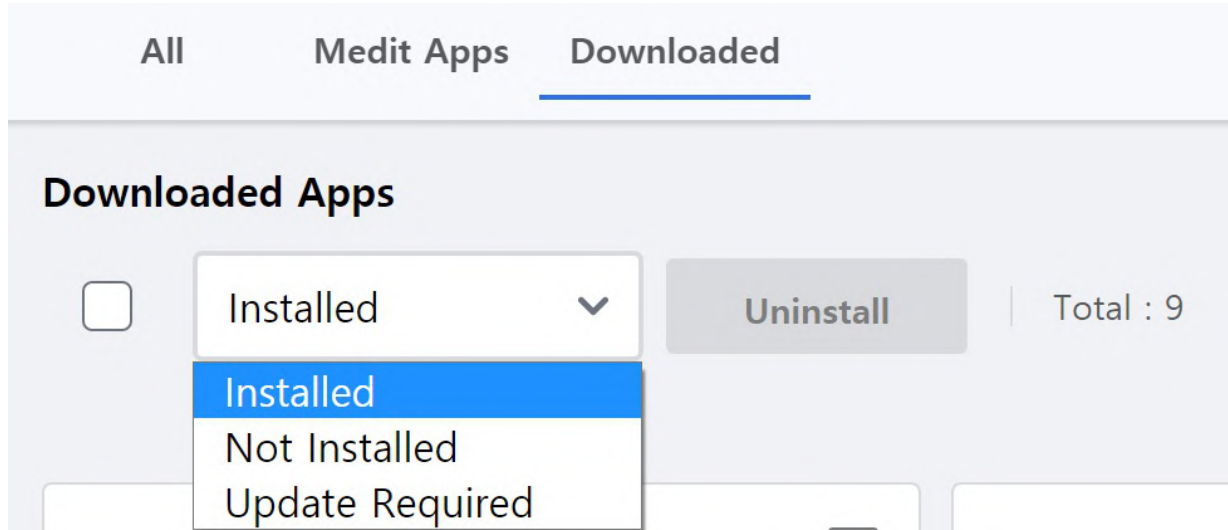

- **Встановлені** — показуються лише застосунки, встановлені на ПК, на якому користувач на цей момент увійшов до системи.
- **Не встановлені** — показуються застосунки, які ви встановили на інших ПК, щоб ви могли швидко їх встановити.
- **Потрібне оновлення** — показуються застосунки, встановлені на поточному ПК, які потребують оновлення.

Trash Box

У Trash Box тимчасово зберігаються видалені проекти. Проект у Trash Box можна відновити або остаточно видалити.

Застереження

Дані, видалені з Trash Box, будуть остаточно видалені з вашого ПК і сервера без можливості відновлення.

MEDIT Link3.2.0

wonhoon choi

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Trash Box

Restore

Selected Cases: 0

All

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Диспетчер синхронізації проєктів

Диспетчер синхронізації проєктів допомагає ефективно передавати та завантажувати проєкти. Ви можете передати декілька проєктів до хмари або завантажити проєкти на локальний ПК. Щоб виявити проєкти, які потребують синхронізації, скористайтесь пошуком і застосуйте фільтри дати.

Case Synchronization Manager

Upload		Download					
☐ All		Case Name Case Name / Contains					
Total Cases: 210		☒ No Date Data Type All					
☐	Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status		
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required		
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required		
☐	BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required		
☐	BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required		
☐	test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required		
☐	i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required		
☐	Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required		
☐	Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required		
☐	Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required		
☐	서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required		
☐	서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required		

Close

Передавання

 Upload	Передавання вибраних проєктів.
 Cancel	Скасування передавання вибраних проєктів.
 Retry	Повторення спроби передавання проєктів, якщо передавання не вдалося.

Завантаження

 Download	Завантаження вибраних проєктів.
 Cancel	Скасування завантаження вибраних проєктів.
 Retry	Повторення спроби завантаження проєктів, якщо завантаження не вдалося.

Пов'язані вебсайти

Ви можете перейти безпосередньо до пунктів меню, доступних лише у вебсервісі Medit Link, таких як My Info, Partners та Membership. Детальну інформацію про меню вебсервісу Medit Link див. в розділі Medit Link > Вебсервіс Medit Link > [Partners](#), [Membership](#) та [My Info](#).

У Medit Shop, онлайн-магазині Medit, можна придбати розширену гарантію для сканерів, а також інші товари Medit, такі як рюкзаки для сканерів.

Ви також можете отримати різноманітну інформацію про використання Medit Link. Отримайте доступ до освітніх та інформаційних ресурсів Medit, таких як Довідковий центр Medit, канал Medit Academy на YouTube та освітня онлайн-платформа Medit Academy.



My Info



Partners



Membership



Shop



Help Center



YouTube



Academy

Переглядач файлів

Переглядач файлів групує та показує різноманітні дані, включно з даними, отриманими в під'єднаних до Medit Link програмах, та даними, прикріпленими користувачами.



Він забезпечує основні функції керування, такі як показ/приховування даних, регулювання непрозорості та видалення даних.

Підтримується попередній перегляд файлів у таких форматах:

- 3D-дані: STL, OBJ, PLY
- 2D-зображення: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Відеофайли: MKV, MP4, AVI, WMV

Дерево даних

В дереві даних можна показувати та групувати всі дані проєкту. Також можна показати/сховати дані, налаштувати прозорість і видалити дані з дерева даних.

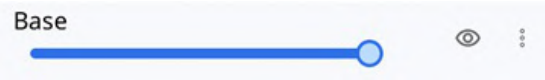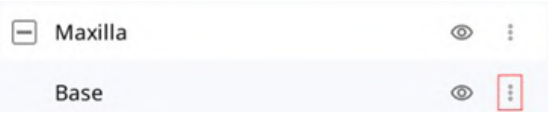	Показати/ сховати	Ви можете показати або сховати дані.
	Непрозорість	Повзунок з'являється, коли ви натискаєте дані в дереві даних. Переміщуйте повзунок, щоб налаштувати непрозорість показаних даних. 
	Більше	Якщо натиснути на значок «Більше», буде показано доступні додаткові функції.  • Показати лише це — ховає всі інші дані, окрім поточних. • Сховати — ховає дані. • Дублювати — копіює дані та додає їх до групи вкладень. • Експорт — експортує вибрані файли. • перейменувати — дозволяє змінити ім'я даних. • Видалити — видаляє дані.

Примітка

Дані можна перейменувати в онлайн-режимі.


Інструменти керування моделлю



Елементи керування 3D-моделлю

	Панорамувати	Переміщує модель.
	Обертати	Обертає модель.
	Збільшити/зменшити	Збільшення та зменшення моделі.
	Підігнати	Розміщення моделі в центрі екрана.
	Режим показу даних	Глянцевий
		Матовий
		Монохромний

Перегляд даних у кольорі з глянцевою поверхнею (фізично коректний рендеринг, або PBR-рендеринг).	
	

Перегляд даних у кольорі з матовою поверхнею (рендеринг Фонга).	
	

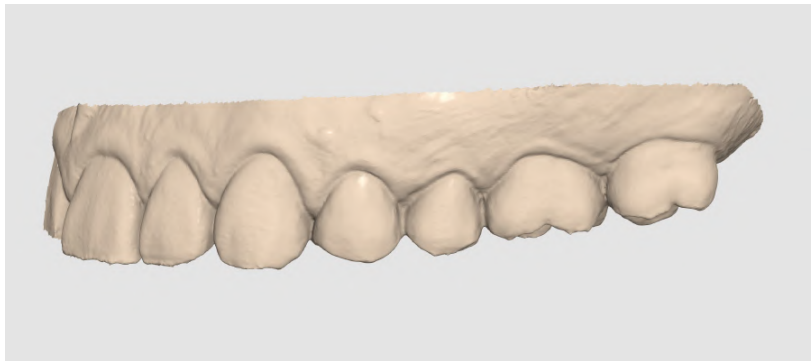Перегляд даних в одному кольорі.	
	

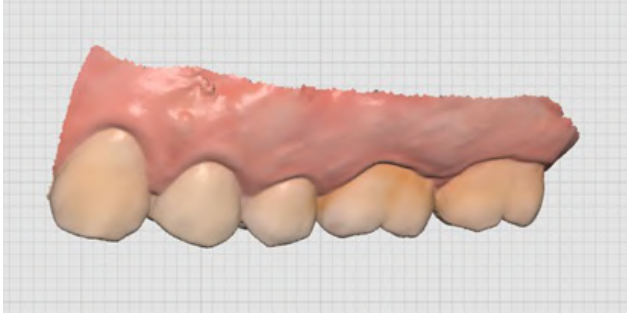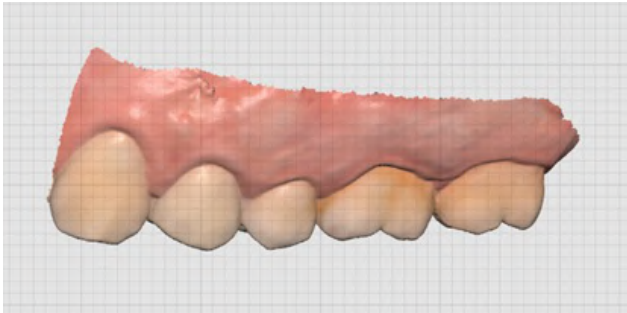	Параметри сітки (mm)	Увімкнути сітку	Показ сітки на задньому плані. 
		Вимкнути сітку	Без сітки на задньому плані.
		Увімкнути накладання	Накладення сітки поверх моделі. 

Керування 2D-зображенням


	Наступне/попереднє зображення	Переміщення між зображеннями.
	Редагувати	Редагування зображення.
 	Закріпити/відкріпити вікно	Ви можете від'єднати вікно з зображенням та перемістити його в потрібне положення. Розмір вікна можна змінити. Якщо перемістити вікно у вихідне положення, його розмір зміниться на розмір за замовчуванням.

Функціональні інструменти

Захоплення зображення й примітка


Ви можете отримати 2D-зображення поточного екрана, малювати на ньому та додавати примітки.


Таке зображення можна зберегти як файл із вашими примітками та надіслати як референсні дані.

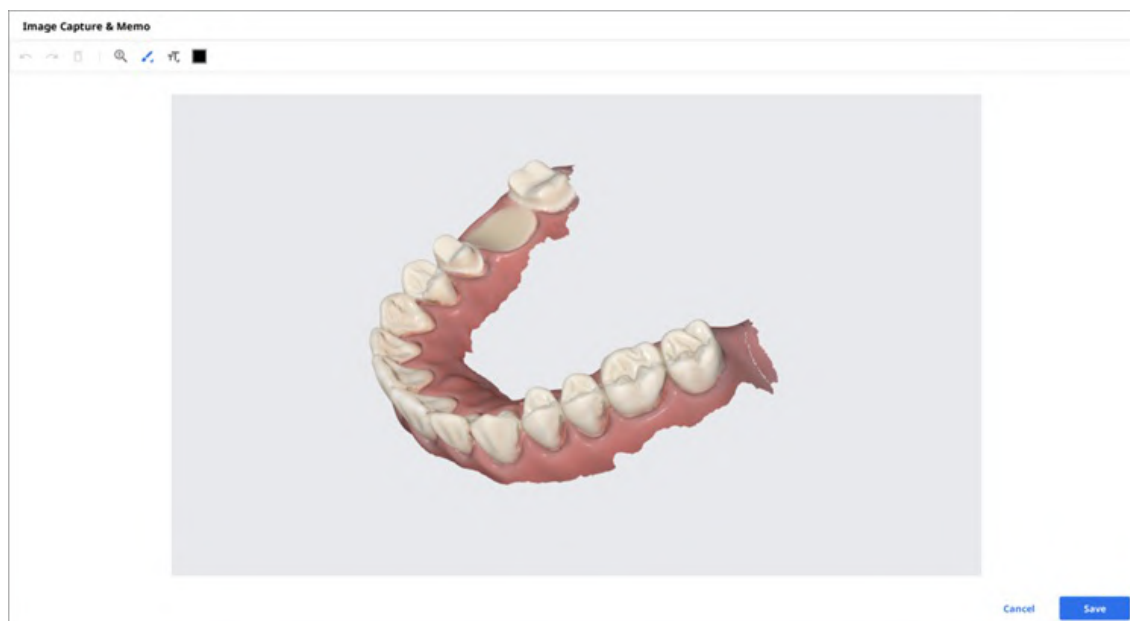

Ортодонтичне захоплення

Отримуйте зображення з поточного напрямку перегляду, а також зверху/знизу/ліворуч/праворуч від поточного напрямку перегляду.

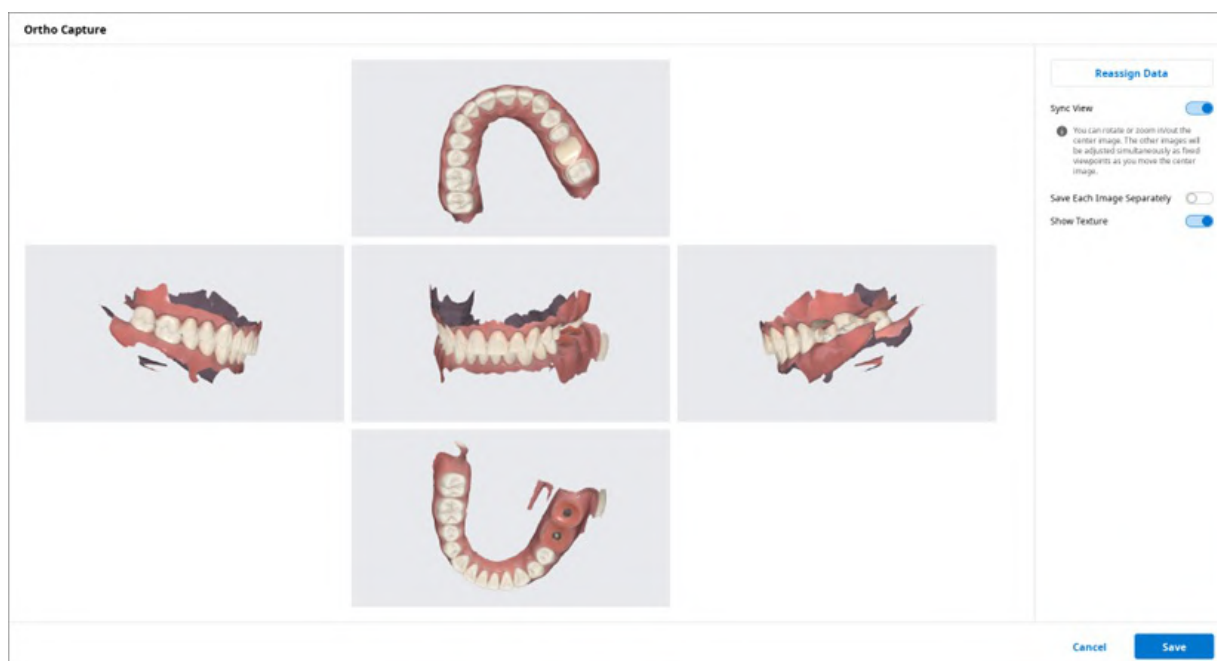

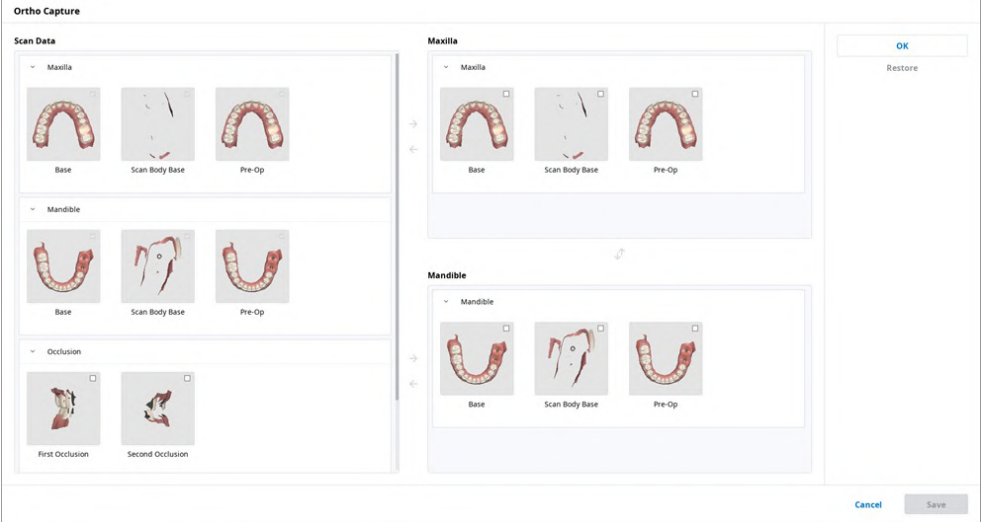Синхронізація виду	Коли ввімкнено, ви можете обертати та збільшувати/зменшувати центральне зображення. Інші зображення будуть автоматично налаштовуватися відповідно до орієнтації центрального зображення. Коли вимкнено, ви можете панорамувати, обертати та збільшувати/зменшувати кожне зображення окремо.
Зберегти кожне зображення окремо	Дозволяє зберегти кожне зображення з високою роздільною здатністю.
Показати текстуру	Дозволяє ввімкнути/вимкнути текстуру моделі.
Перепризначити дані	За допомогою функції «Перепризначити дані» можна змінювати дані верхньої/нижньої щелепи. Змінені дані можна застосовувати для створення та використання зображень результатів ортодонтичного захоплення.  • Дані сканування — показуються дані сканування для проекту. • Верхня щелепа — показуються дані, які ви вибрали для верхньої щелепи. • Нижня щелепа — показуються дані, які ви вибрали для нижньої щелепи.


Заповнити пусті місця

Заповніть пусті місця на 3D-даних.



Обрізання


Функція обрізання забезпечує різноманітні інструменти для редагування даних.

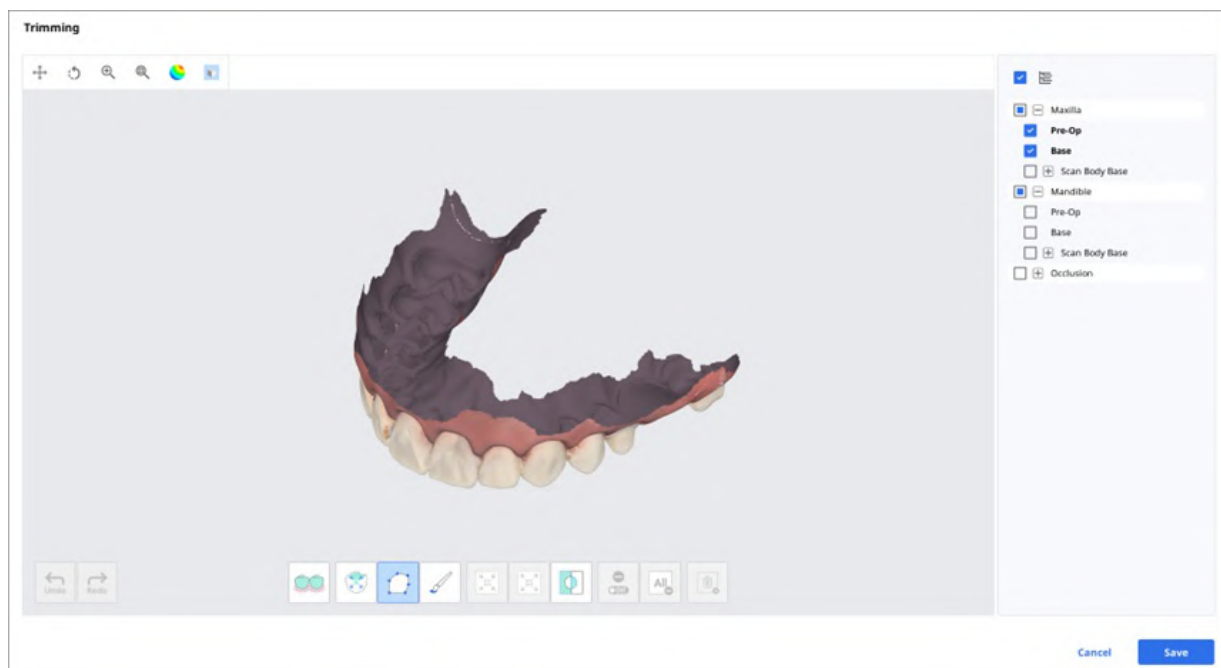

Вибрані 3D-дані можна редагувати за допомогою різноманітних інструментів, розташованих у нижній частині вікна.

Вибір		Розумний вибір зубів	Автоматичний вибір усіх зубів дуги без ясен.  Примітка Ця функція доступна лише для даних сканування, отриманих за допомогою Medit Scan for Clinics з увімкненою опцією «Використовувати графічний процесор».
		Розумний вибір одного зуба	Автоматичний вибір зони одного зуба одним клацанням. Зуб можна вибрати клацанням або клацанням і перетягуванням.
		Вибір полілінією	Вибір всіх об'єктів у формі, намальованій полілінією на екрані.
		Вибір пензлем	Вибір усіх об'єктів на траєкторії, намальованій пензлем на екрані. Буде вибрано лише передню частину даних. Пензель має три розміри.
Налаштування вибраної зони		Зменшити вибрану зону	Зменшує вибрану зону кожен раз, коли користувач натискає кнопку.
		Розширити вибрану зону	Розширює вибрану зону кожен раз, коли користувач натискає кнопку.
		Інвертувати вибрану зону	Інвертує вибрану зону.
Скасування вибору		Вибір/скасування вибору	Коли увімкнено, дозволяє скасувати вибір зони за допомогою різноманітних інструментів.
		Очистити весь вибір	Скасовує вибір всіх вибраних зон.
		Видалити вибрану зону	Видаляє дані у вибраній зоні.

1. За допомогою інструментів вибору зони виберіть зону, яку потрібно обрізати.

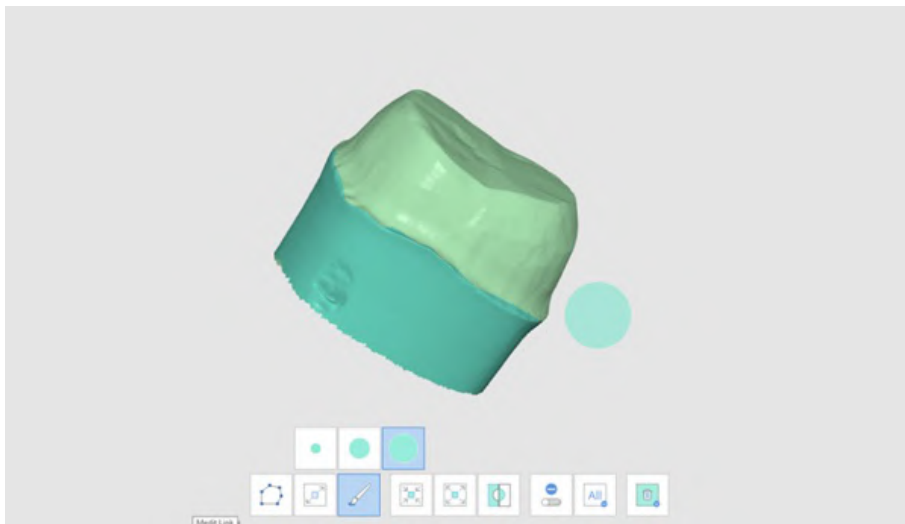


Примітка


Інструмент «Обрізання полілінією» дозволяє вибрати всі об'єкти в межах форми, намальованої полілінією, а інструмент «Обрізання пензлем» дозволяє вибрати лише лицьову сторону даних.

2. Ви можете інвертувати, зменшувати або розширювати вибрану зону за допомогою таких трьох інструментів:


- Інвертувати вибрану зону

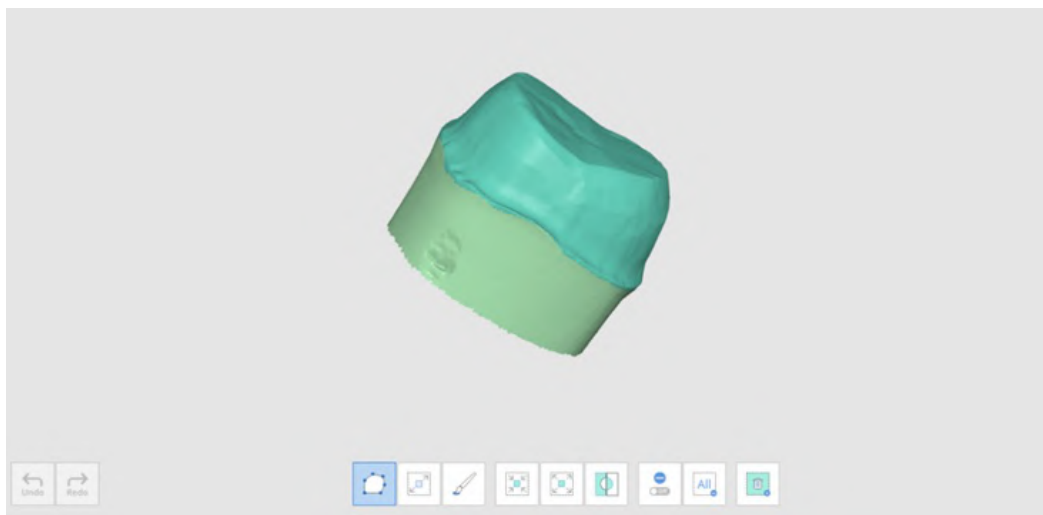

- Зменшити вибрану зону

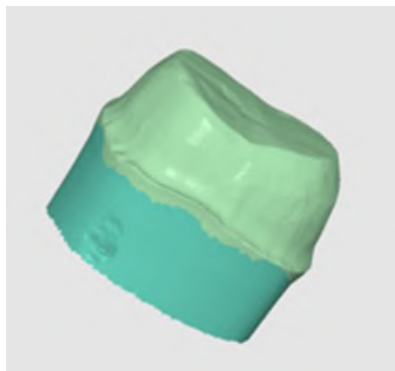

- Розширити вибрану зону

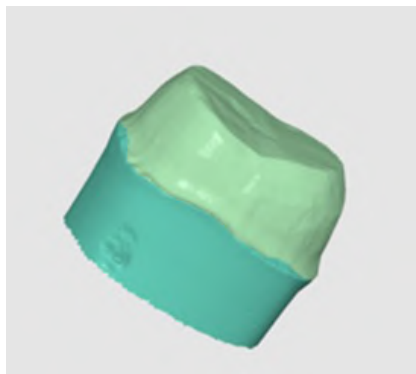



3. Скасувати виділення вибраних зон можна за допомогою інструмента «Видалити вибрану зону».

Оптимізувати зіставлення оклюзії

Ви можете оптимізувати зіставлення оклюзії. Виберіть цільові дані та налаштуйте зіставлення оклюзії.




Рівень компенсації

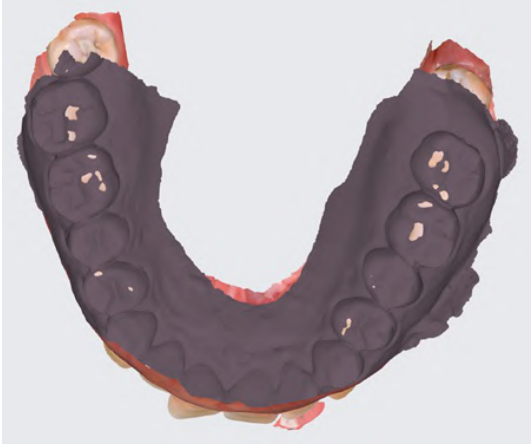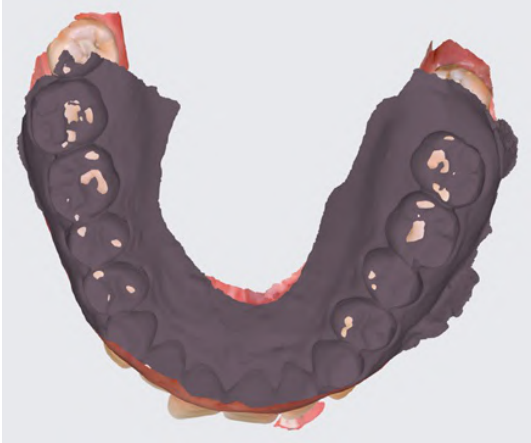Низький	Compensation Level 	
Середній	Compensation Level 	
Високий	Compensation Level 	
Вимкнути	Compensation Level 	

Рух нижньої щелепи

Ви можете відтворити рухи нижньої щелепи, записані в Medit Scan for Clinics, щоб побачити динамічні оклюзійні контакти між верхнім і нижнім зубними рядами.

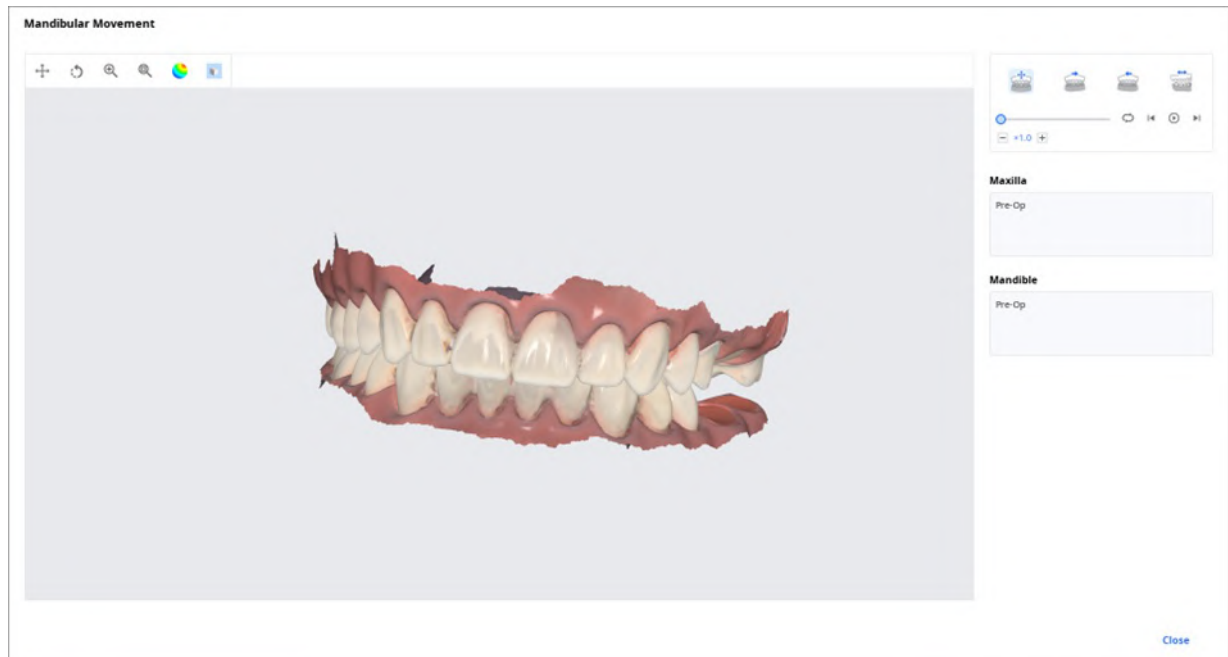

	Вільний рух	Відтворення запису вільного руху нижньої щелепи.
	Лівий боковий рух	Відтворення запису руху нижньої щелепи ліворуч.
	Правий боковий рух	Відтворення запису руху нижньої щелепи праворуч.
	Протрузивний рух	Відтворення запису руху нижньої щелепи вперед.

Керування даними множинної оклюзії в переглядачі файлів

Ви можете отримати множинні результати оклюзії в застосунку для сканування Medit.

Керувати цими результатами можна в переглядачі файлів у Medit Link.

Як керувати множинними результатами


Коли ви отримуєте множинні результати оклюзії в Medit Scan for Clinics, то можете вибрати потрібний результат в Medit Link.

Перелік результатів впорядкований за ім'ям, і ви можете вибрати один елемент.

Вибрану модель буде показано в дереві даних та зоні показу моделі.



Ви можете згорнути перелік і змінити елемент за допомогою стрілок.

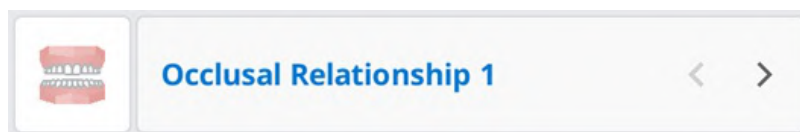

Опції перегляду

Ви можете змінити опції перегляду, щоб налаштувати компонування переліку проєктів у розділах Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Фільтри статусу

Ви можете показати або сховати кожен фільтр, який показує статус проєкту. Приховані фільтри статусу не показуються на екрані в розділах Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

За допомогою фільтрів статусу можна легко знайти потрібний проєкт.

- Натисніть на статус, щоб подивитися лише проєкти з цим статусом.
- Можна вибрати декілька статусів одночасно.

Залежно від розділу доступні такі фільтри статусу:

Розділ	Фільтри статусу
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Елементи таблиці

Виберіть елементи для показу в переліку проєктів у розділі Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Ви можете змінити порядок елементів таблиці та налаштувати ширину стовпців на виді переліку для максимальної зручності використання.

Залежно від розділу доступні такі елементи таблиці:

Розділ	Елементи таблиці
Patient	Ім'я пацієнта / Ідентифікатор пацієнта / Стать / Кількість проєктів / Дата реєстрації / Дата народження / Дата останнього сканування
Case Box	Статус / Назва проєкту / Дата народження / Інформація форми / Дата останньої зміни / Дата сканування / Дата замовлення / Назва лабораторії
Order Box	Статус / Назва проєкту / Ім'я пацієнта / Дата сканування / Дата замовлення / Назва лабораторії / Запитана дата доставлення / Дата останньої зміни
In Box	Статус / Назва проєкту / Дата замовлення / Запитана дата доставлення / Дата останньої зміни / Назва клініки
Work Box	Статус / Назва проєкту / Ім'я пацієнта / Інформація форми / Дата останньої зміни / Запитана дата доставлення / Дата сканування / Назва клініки / Дата замовлення

Тип перегляду

В розділі Case Box можна змінювати тип перегляду між «Вид галереї» та «Вид переліку».

Залежно від розділу доступні такі типи перегляду:

Розділ	Опції типу перегляду
Patient	Вид переліку
Case Box	Вид переліку/вид галереї
Order Box	Вид переліку
In Box	Вид переліку
Work Box	Вид переліку

Групування

Виберіть опцію групування, щоб класифікувати та впорядковувати проєкти в переліку.

Залежно від розділу доступні такі опції групування:

Розділ	Опції групування
Case Box	Немає / Ім'я пацієнта / Дата сканування / Дата замовлення
Order Box	Немає / Дата сканування / Дата замовлення / Запитана дата доставлення
In Box	Немає / Дата замовлення / Запитана дата доставлення
Work Box	Немає / Запитана дата доставлення

Примітка

Опції групування доступні в розділах Patient, Case Talk і Trash Box.

Сортування

Виберіть опцію сортування, щоб змінити порядок проєктів у переліку.

Залежно від розділу доступні такі опції сортування:

Розділ	Групування	Опції сортування
Patient	-	Ім'я пацієнта / Ідентифікатор пацієнта / Дата народження / Дата реєстрації / Кількість проєктів / Дата останнього сканування
Case Box	Немає	Ім'я пацієнта / Дата останньої зміни / Дата сканування / Дата замовлення / Назва лабораторії
	Ім'я пацієнта	Дата останньої зміни / Дата сканування / Дата замовлення / Назва лабораторії
	Дата сканування	Ім'я пацієнта / Дата останньої зміни / Дата замовлення / Назва лабораторії
	Дата замовлення	Ім'я пацієнта / Дата останньої зміни / Дата сканування / Назва лабораторії
Order Box	Немає	Ім'я пацієнта / Дата сканування / Дата замовлення / Запитана дата доставлення / Назва лабораторії
	Дата сканування	Ім'я пацієнта / Дата замовлення / Запитана дата доставлення / Назва лабораторії
	Дата замовлення	Ім'я пацієнта / Дата сканування / Запитана дата доставлення / Назва лабораторії
	Запитана дата доставлення	Ім'я пацієнта / Дата сканування / Дата замовлення / Назва лабораторії
In Box	Немає	Ім'я пацієнта / Дата замовлення / Запитана дата доставлення / Назва клініки
	Дата замовлення	Ім'я пацієнта / Дата сканування / Запитана дата доставлення / Назва клініки
	Запитана дата доставлення	Ім'я пацієнта / Дата замовлення / Назва клініки
Work Box	Немає	Ім'я пацієнта / Дата останньої зміни / Запитана дата доставлення / Назва клініки
	Запитана дата доставлення	Ім'я пацієнта / Дата останньої зміни / Назва клініки


Примітка

Опції сортування недоступні в Case Talk і Trash Box.

Фільтрування та пошук

Фільтрування за пацієнтом

Фільтруйте та показуйте проекти за ім'ям пацієнта. Ви можете створити перелік, відфільтрувавши тільки пацієнтів, з якими вам потрібно працювати.

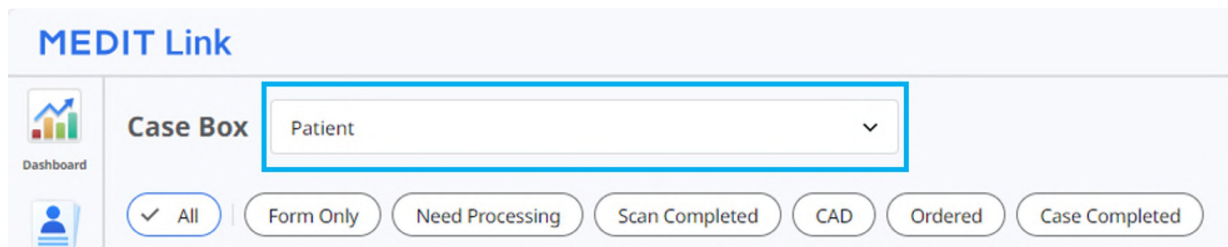


MEDIT Link

Case Box Patient

Dashboard

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. Введіть ім'я пацієнта.

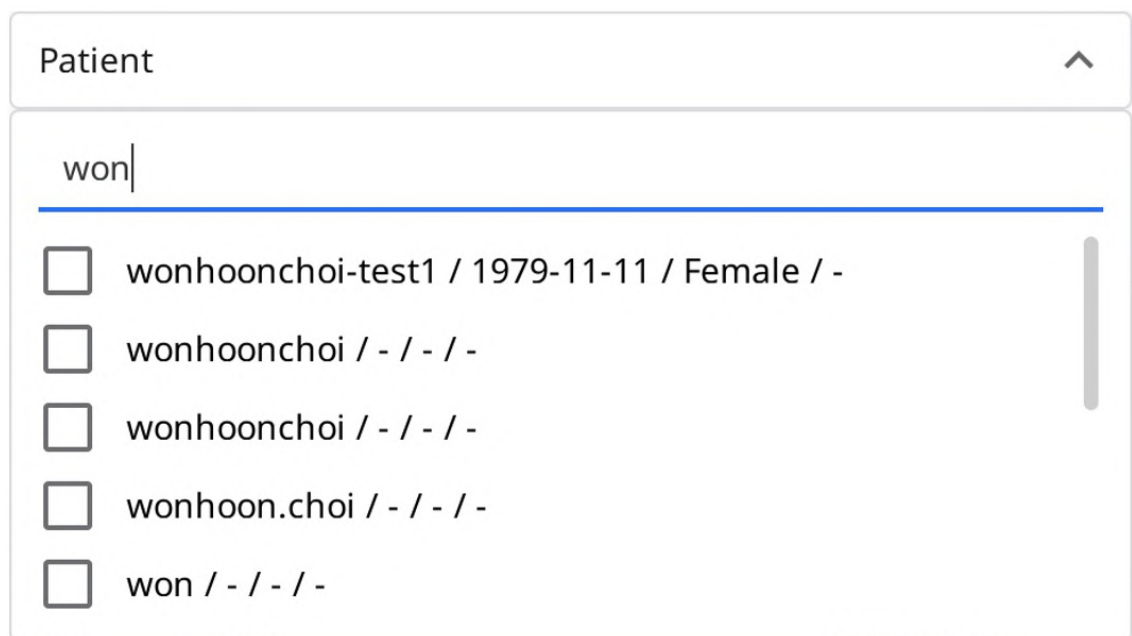

Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Виберіть пацієнтів в результатах пошуку.

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2 ^

won|

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -

☐ wonhoonchoi / - / - / -

☐ won / - / - / -

☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234

☐ won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

☒ wonhoonchoi / - / - / -

☒ wonhoon.choi / - / - / -

☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. В переліку будуть показані лише проекти вибраних пацієнтів.

MEDIT Link 3.2.0

Wonhoon Choi_clinic

Case Box

wonhoonchoi / - / - / -

+ 2

All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Case Completed

Total Cases: 20

2018-01-01-2023-10-24

All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalCase	-	2023-10-05 08:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 08:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 08:14	2023-02-09 08:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 02:05	2023-02-09 08:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 03:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 04:41	2023-02-09 08:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 08:13	2023-02-09 08:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 11:27	2023-02-09 08:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 07:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 09:26	2023-02-09 09:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 08:50	2023-02-09 08:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 10:30	2022-10-11 05:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 10:28			

Фільтрування за датою.

Ця функція дозволяє фільтрувати та показувати проекти, останні зміни до яких були внесені протягом заданого періоду часу.

1. Натисніть фільтр діапазону дат.



2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Виберіть діапазон із переліку.

- Всі — будуть показані всі проекти.
- Користувачський діапазон — вкажіть дату початку та закінчення, щоб показати всі проекти, востаннє змінені в цей період.
- Сьогодні — будуть показані проекти, останні зміни до яких були внесені сьогодні.
- Вчора — будуть показані проекти, останні зміни до яких були внесені вчора.
- Останні 7 днів — будуть показані проекти, останні зміни до яких були внесені протягом останніх 7 днів, не враховуючи сьогоднішній день.
- Останні 30 днів — будуть показані проекти, останні зміни до яких були внесені протягом останніх 30 днів, не враховуючи сьогоднішній день.
- Цей місяць — будуть показані проекти, останні зміни до яких були внесені цього місяця.
- Попередній місяць — будуть показані проекти, останні зміни до яких були внесені протягом попереднього місяця.

Перелік проектів оновлюватиметься в режимі реального часу з урахуванням проектів, створених або змінених протягом вибраного періоду.

Розширені можливості пошуку

Використовуйте можливості пошуку, щоб швидко знайти потрібну інформацію.

All

▼

Search / Contains

🔍

Для кожного розділу доступні такі критерії пошуку:

Patient	Усі, ім'я пацієнта, ідентифікатор пацієнта
Case Box	Усі, назва проекту, ім'я пацієнта, ідентифікатор пацієнта, інформація форми, назва лабораторії
Order Box	Усі, назва проекту, ім'я пацієнта, ідентифікатор пацієнта, назва лабораторії, ідентифікатор замовлення
In Box	Усі, назва проекту, ім'я пацієнта, назва клініки, ідентифікатор замовлення
Work Box	Усі, назва проекту, ім'я пацієнта, інформація форми, назва клініки, ідентифікатор замовлення
Case Talk	Назва Case Talk (містить), ім'я пацієнта (дорівнює)
Trash Box (клініка)	Усі, назва проекту, ім'я пацієнта, назва лабораторії, ким видалено
Trash Box (лабораторія)	Усі, назва проекту, ім'я пацієнта, назва клініки, ким видалено

Ви можете задати критерії пошуку та вибрати логіку «Містить» або «Дорівнює».

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains

☐ Equals

Створення/редагування/клонування/видалення проєктів

Створення проєктів

Створення проєкту в Case Box (клініка)

1. Натисніть кнопку «Новий проєкт» у верхньому правому кутку.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Введіть основну інформацію, таку як ім'я пацієнта та назва проєкту.
 - Якщо ви введете ім'я, якого немає у списку пацієнтів, буде додано нового пацієнта.
 - Якщо ви введете ім'я, яке є у списку пацієнтів, ви зможете вибрати пацієнта зі списку.
 - Якщо ви реєструєте проєкт для наявного пацієнта, натисніть значок переліку пацієнтів, щоб вибрати наявного пацієнта.



- У діалоговому вікні «Перелік пацієнтів» можна зареєструвати нового пацієнта або відредагувати інформацію про наявного пацієнта.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

AB Search / Contains

+ New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select


3. Назву проєкту буде заповнено автоматично, але ви зможете її змінити.
4. Натисніть «Зареєструвати та сканувати», щоб завершити реєстрацію проєкту та перейти до

сканування.

- **Зареєструвати** — вас буде перенаправлено на головну сторінку. Це зручно в разі реєстрації декількох проєктів.
- **Зареєструвати та сканувати** — вас буде перенаправлено на вкладку «Форма» для реєстрації інформації форми для проєкту.

Створення проєкту в Work Box (лабораторія)

1. Натисніть кнопку «Новий проєкт» у верхньому правому кутку.

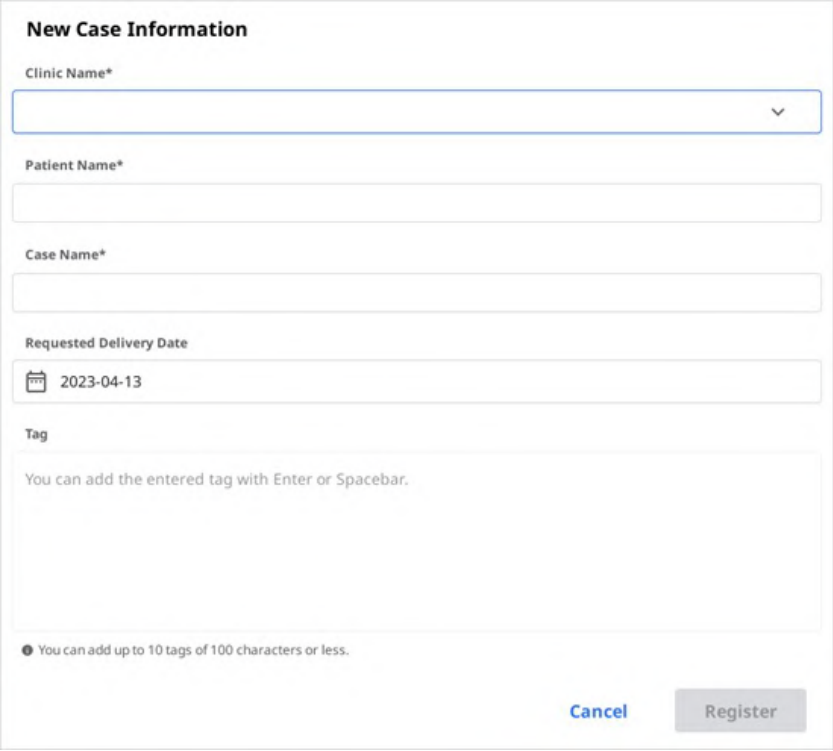

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Введіть або виберіть назву клініки.
3. Введіть ім'я пацієнта та назву проєкту. Назву проєкту буде заповнено автоматично, але ви зможете її змінити.
4. Введіть очікувану дату доставлення з урахуванням дати завершення роботи.
5. Після реєстрації проєкту ви будете перенаправлені на головну сторінку.

Редагування проєктів

Редагування проєкту в Case Box (клініка)

1. Натисніть «Редагувати» поряд із назвою проєкту.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion 

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

- Щоб змінити ім'я пацієнта, натисніть значок пошуку. Зверніть увагу, що ім'я не можна редагувати напряму, але ви можете знайти у переліку пацієнта, якому хочете змінити ім'я, та відредагувати його інформацію.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhaen Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

- Відмітьте пацієнта, інформацію якого ви хочете змінити.
- Щоб створити нового пацієнта, натисніть кнопку «Новий пацієнт».
- Використовуйте кнопку «Редагувати», щоб змінити зареєстровану інформацію про пацієнта.
- Натисніть «Застосувати», щоб завершити процес.

Редагування проєкту в Work Box (лабораторія)

- Натисніть «Редагувати» поряд із назвою проєкту.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. Натисніть кнопку «Застосувати» після завершення редагування.

Примітка

Ви не можете редагувати інформацію проєктів, отриманих через замовлення в In Box.

Клонування проєктів

Клонування проєкту в Case Box (клініка)

1. Натисніть значок «Клонувати» зверху.



2. У вас буде запитано, яку інформацію ви хочете клонувати до нового проєкту.

Information

Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Виберіть, клонувати лише інформацію форми чи всі дані.
4. Після завершення клонування буде створено проєкт із назвою «[Назва проєкту] – Клон».

Клонування проєкту в Work Box (лабораторія)

1. Натисніть значок «Клонувати» зверху.



2. Продублюйте всі дані, щоб створити новий проєкт.
3. Після завершення клонування буде створено проєкт із назвою «[Назва проєкту] – Клон».


Видалення проєктів

Видалення проєкту (клініка та лабораторія)

1. Натисніть значок «Видалити».



2. Натисніть «ОК», щоб видалити проєкт.

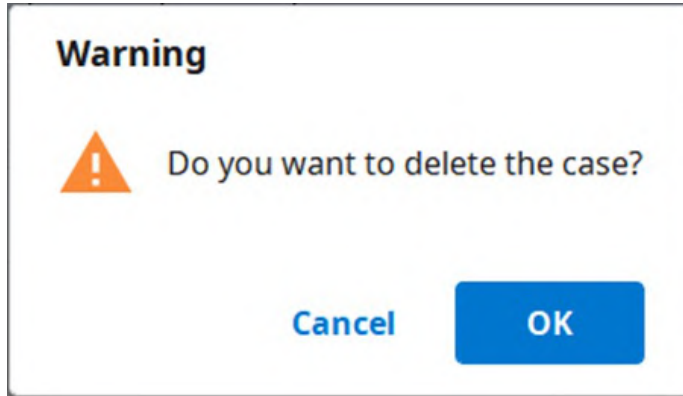

3. Видалені проєкти переміщуються до Trash Box і за необхідності можуть бути відновлені.

Інформація форми

Інформація форми, яку потрібно ввести, залежить від під'єднаної програми та типу лікування.

Введена інформація буде використовуватися як базова інформація для роботи в програмах сканування або CAD, а також для замовлення.

Реєстрація інформації форми в Case Box

Введення на вкладці «Форма»

1. Виберіть, будете ви вводити інформацію про лікування по зубах чи по дузі.
2. Виберіть Тип – Метод – Матеріал – Відтінок.
 - Якщо введена некоректна інформація, можна повернутися та вибрати коректну інформацію.
 - Вибрана інформація автоматично реєструється в переліку замовлення.
3. Натисніть «Зберегти», щоб зберегти зареєстровану інформацію.

Реєстрація інформації форми в Work Box

Введення на вкладці «Форма»

1. Виберіть програму сканування, яку хочете використовувати.
2. Серед представлених опцій виберіть ту, яка буде визначати вашу стратегію сканування: зуби/гнучкий мультиштамп/мультиштамп.
3. Методи можуть відрізнятися залежно від вибраної програми сканування.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Зуби	O	O
Дуга	O	O
Гнучкий мультиштамп	X	O
Мультиштамп	X	O

4. Виберіть номери зубів, дуги або штампів для сканування.
5. Виберіть Тип – Метод – Матеріал – Відтінок.
 - Якщо введена некоректна інформація, можна повернутися та вибрати коректну інформацію.
 - Вибрана інформація автоматично реєструється в переліку.
6. Натисніть «Зберегти», щоб зберегти зареєстровану інформацію.

З'єднання зубів у міст

Ви можете з'єднати кілька зубів у міст, якщо той самий матеріал застосовується до кількох сусідніх зубів. Натисніть значок моста поруч із вибраними зубами, щоб з'єднати або роз'єднати їх.



Налаштування параметрів сканування

Опції сканування залежать від програми, з якою ви працюєте.

Вибрані параметри сканування передаються до відповідної програми сканування.

Medit Scan for Labs

Загальні параметри

	Сусідні зуби	Дозволяє позначити препаровані й сусідні зуби та передати цю інформацію до програми сканування.
	Антагоніст	Автоматично позначає антагоніста та передає цю інформацію до програми сканування.
	Артикулятор	Показує опції для вибору артикулятора в програмі сканування.
	Маркер руху	Дозволяє використовувати стратегію сканування «Рух щелепи» в програмі сканування.

Параметри для зубів

	Сканмаркер	Дозволяє задати стратегію сканування сканмаркерів у програмі сканування.
	Передопераційне сканування	Дозволяє задати стратегію сканування передопераційної моделі в програмі сканування.
	Сканування воскової моделі	Дозволяє задати стратегію сканування воскових моделей у програмі сканування.

Додавання до вибраного

Ви можете швидко вибрати продукт, додавши його до вибраного.

Списком вибраного можна керувати як шаблоном, а також імпортувати та експортувати.

Як додати до вибраного

1. Виберіть номер зуба.
2. Виберіть Тип – Метод – Матеріал – Відтінок.
 - Тип – Метод – Матеріал – Відтінок можуть бути додані до вибраного, навіть якщо не всі вони вибрані.
3. Натисніть значок зірочки.

4. Комбінацію вибраних параметрів, за винятком номера зуба, буде додано до вибраного.

Керування вибраними шаблонами

Ви можете реєструвати різноманітні типи шаблонів, керувати ними та надавати до них доступ.

Додати	Додає новий шаблон.
Перейменувати	Перейменовує поточний шаблон.
Видалити	Видаляє поточний шаблон.
Експорт	Експортує поточний шаблон у файл.
Імпорт	Імпортує файл шаблону.

Сканування/робота з CAD

Сканування

Після введення інформації ви переходите до сканування.

1. Введіть/збережіть інформацію про лікування та виберіть потрібні параметри сканування.
2. Натисніть кнопку «Сканувати» у верхньому правому куті вікна.

Робота з CAD


Для під'єднання Medit Link до DentalCAD в Medit Link надається застосунок DentalCAD Integration.

1. Встановіть застосунок DentalCAD Integration в App Box.
2. Перейдіть до деталей проєкту та натисніть значок застосунку DentalCAD Integration на панелі швидкого запуску.
3. У спливному діалоговому вікні вкажіть шлях до встановленого на ПК застосунку DentalCAD.
4. Введіть дані просканованого проєкту та натисніть значок застосунку DentalCAD Integration, щоб з'явилося діалогове вікно створення файлу dentalProject.
5. Зареєструйте інформацію форми для DentalCAD та натисніть «Відкрити», щоб відкрити програму CAD.
6. Якщо ви встановите застосунок DentalDB Integration, то зможете автоматично зберігати результати CAD в папці, вказаній в exocad (лише для облікових записів лабораторій).


Використання додаткових застосунків

Панель швидкого запуску

Ви можете напряму запускати різноманітні додаткові застосунки, натискаючи значки встановлених застосунків на панелі швидкого запуску. Порядок значків застосунків можна змінити, перетягуючи їх.

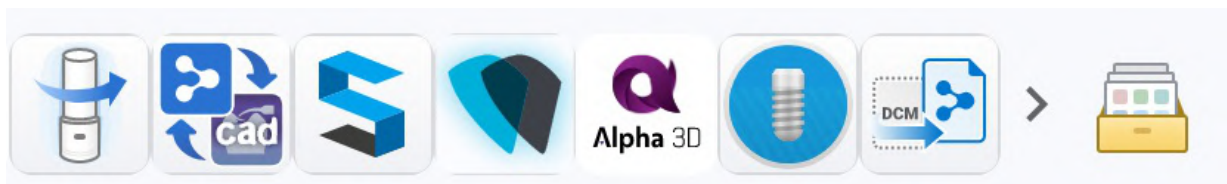

Керування запуском застосунків

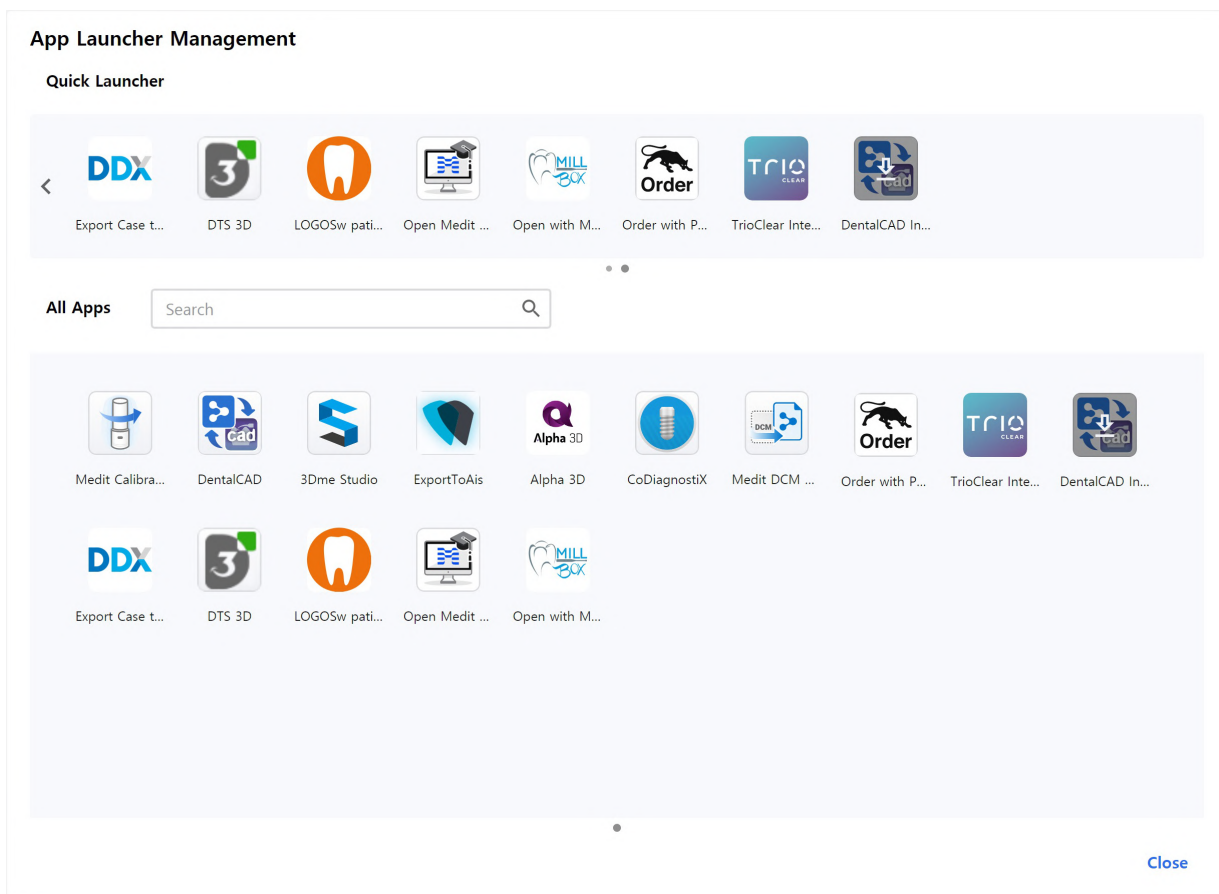

Панель швидкого запуску

Ви самі визначаєте, які застосунки будуть на панелі швидкого запуску. Порядок значків застосунків можна змінити, перетягуючи їх. Можна створити папки для групування схожих застосунків.

Усі застосунки

Тут показуються всі встановлені застосунки. Щоб додати застосунок на панель швидкого запуску, клацніть його значок правою кнопкою миші. У контекстному меню, яке викликається правою кнопкою миші, також можна вибрати запуск, встановлення або видалення застосунку.

Отримання файлів результатів

Експорт файлів результатів сканування

Крім надання результатів партнерам через замовлення, Medit Link дозволяє зберегти файли результатів у потрібному форматі за допомогою функції експорту.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

[Preview](#)

Close


Export

121

Експорт файлів до	Вкажіть шлях для збереження файлів результатів.
Ім'я папки	Система створює нову папку і зберігає в ній усі файли результатів. За замовчуванням ім'я папки задається правилом іменування. Ви можете перейменувати папку. Задати правило іменування можна в розділі Параметри > Опції експорту > Правила іменування папок.
Ім'я файлу	Задайте ім'я файлу результатів. За замовчуванням ім'я файлу задається правилом іменування. Ви можете перейменувати файл. Задати правило іменування можна в розділі Параметри > Опції експорту > Правила іменування файлів.
Тип	Виберіть програму проєктування, яку хочете використовувати. Medit Link автоматично налаштує файли відповідно до вашого вибору, що дозволить вам розпочати проєктування без необхідності додаткового вирівнювання по осях.
Mesh-формат	Вкажіть формат mesh-файлу.
Формат зображення	Вкажіть формат файлів зображень, що експортуються.
Стиснути файли	Стисніть всі результати в один файл.
Об'єднати mesh-дані під час експорту	Об'єднайте результати сканування верхньої або нижньої щелепи з даними сканування окремих зубів. Це стані в пригоді, коли імпорт декількох файлів до програми неможливий.
Експорт усіх оклюзійних відносин	Якщо програма для сканування генерує множинні результати оклюзії, ви можете експортувати всі результати оклюзії одночасно.
Зберегти інформацію про проєкт як PDF-файл	Збережіть інформацію про проєкт у форматі PDF разом із результатами.

Експорт файлів результатів із переліку проєктів

За допомогою функції «Експорт», розташованої над списком проєктів у Case Box та Work Box, можна експортувати файли результатів одного або декількох проєктів одночасно.

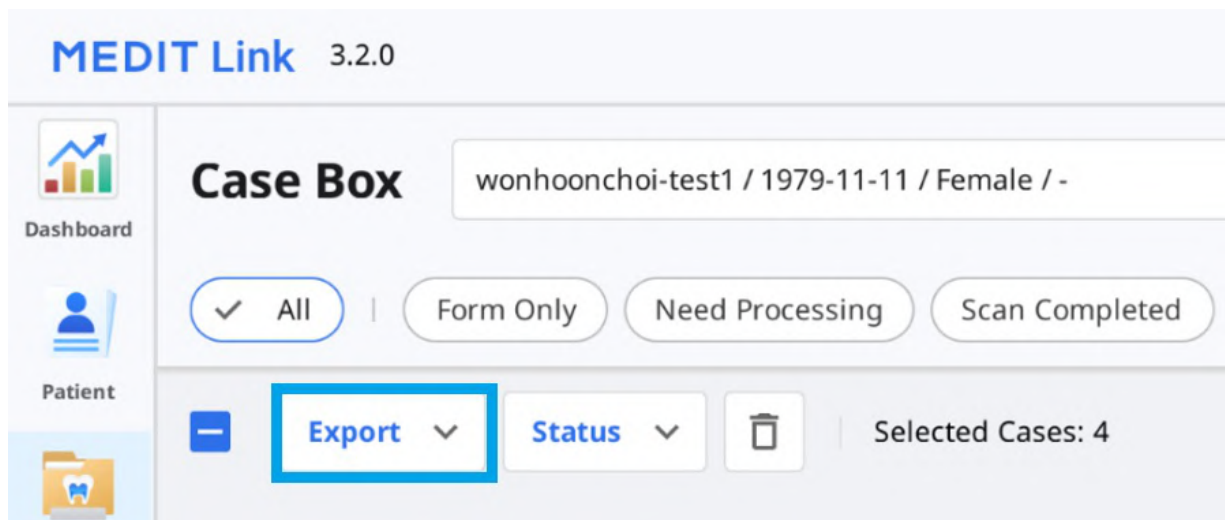

1. Перейдіть до Case Box або Work Box.
2. Виберіть із переліку всі проєкти, файли результатів яких ви хочете експортувати.

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 Status ▾ |
 |
 Selected Cases: 4

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

Dashboard
 Patient
 Case Box
 Order Box
 Case Talk
 App Box

3. Натисніть «Експорт» і виберіть «Файли результатів».

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. Вкажіть папку призначення, тип файлу, mesh-формат та формат зображень, а також виберіть параметри експорту на вкладці «Параметри».

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type 

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

Примітка

Поля «Ім'я папки» та «Ім'я файлу» не можуть бути відредаговані під час експорту файлів декількох проєктів.

Ім'я папки та ім'я файлу автоматично створюються відповідно до правил, заданих у параметрах «Правило іменування папок» та «Правило іменування файлів» у розділі Параметри > Опції експорту.

- Натисніть «Експорт».
- Натисніть «Так», щоб відкрити папку, до якої збережено файли.

Question




Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Експорт файлів результатів із переглядача файлів

Ви можете експортувати файли результатів сканування для проєкту за допомогою значка «Експорт», розташованого у правому верхньому куті вкладки «Переглядач файлів».

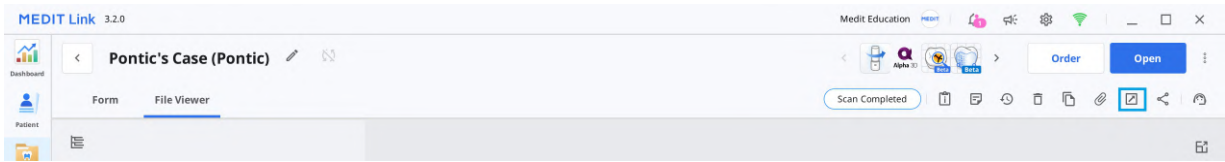


1. Перейдіть до Case Box або Work Box.
2. Натисніть, щоб відкрити проєкт із переліку.
3. Натисніть значок «Експорт» у верхньому правому куті вкладки «Переглядач файлів».




4. Вкажіть папку призначення, ім'я папки, тип файлу, mesh-формат та формат зображень, а також виберіть параметри експорту на вкладці «Параметри».

5. На вкладці «Перелік файлів» можна вибрати потрібні для проєкту файли, знявши виділення з непотрібних.

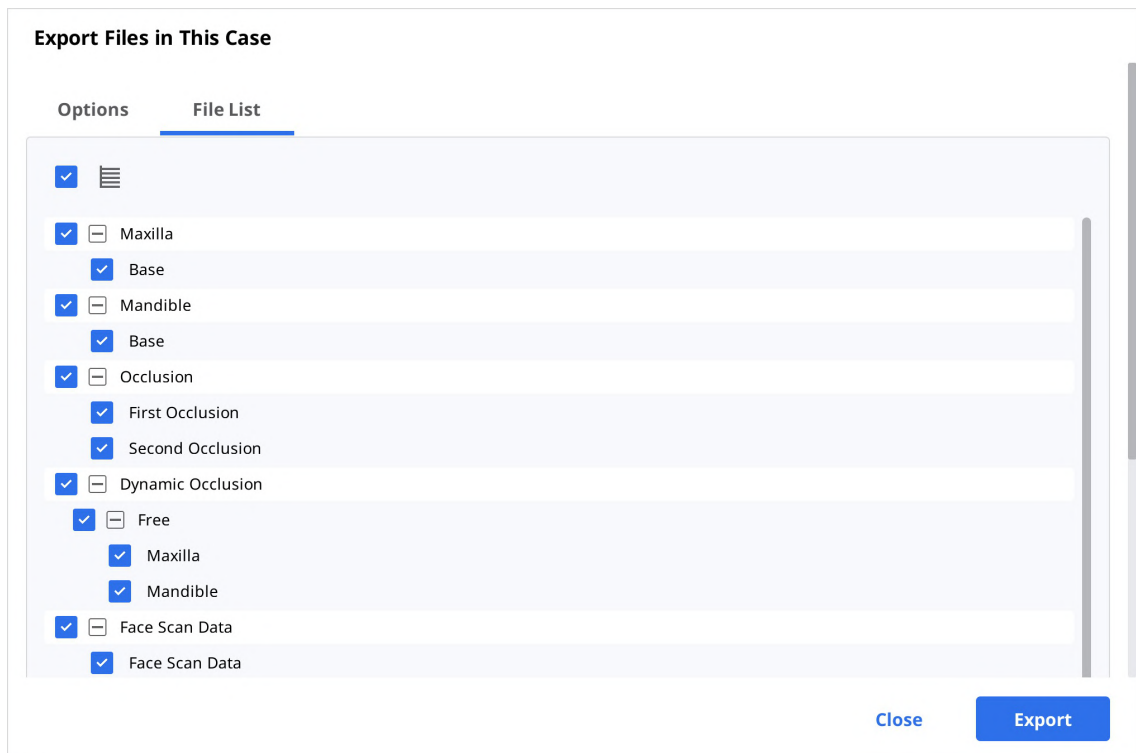


6. Натисніть «Експорт».

7. Натисніть «Так», щоб відкрити папку, до якої збережено файли.

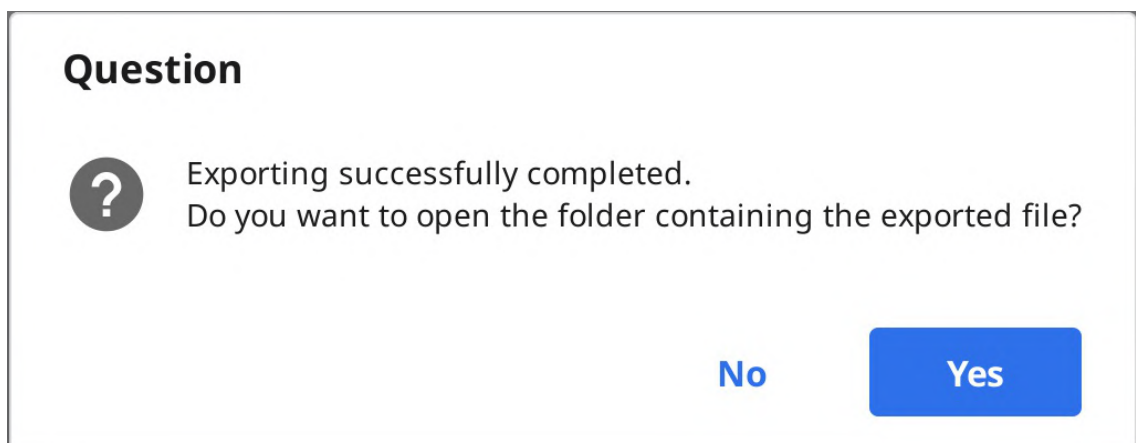

Експорт файлів результатів із дерева даних


Ви можете експортувати файл або файли певної групи даних за допомогою випадного меню в переглядачі файлів.

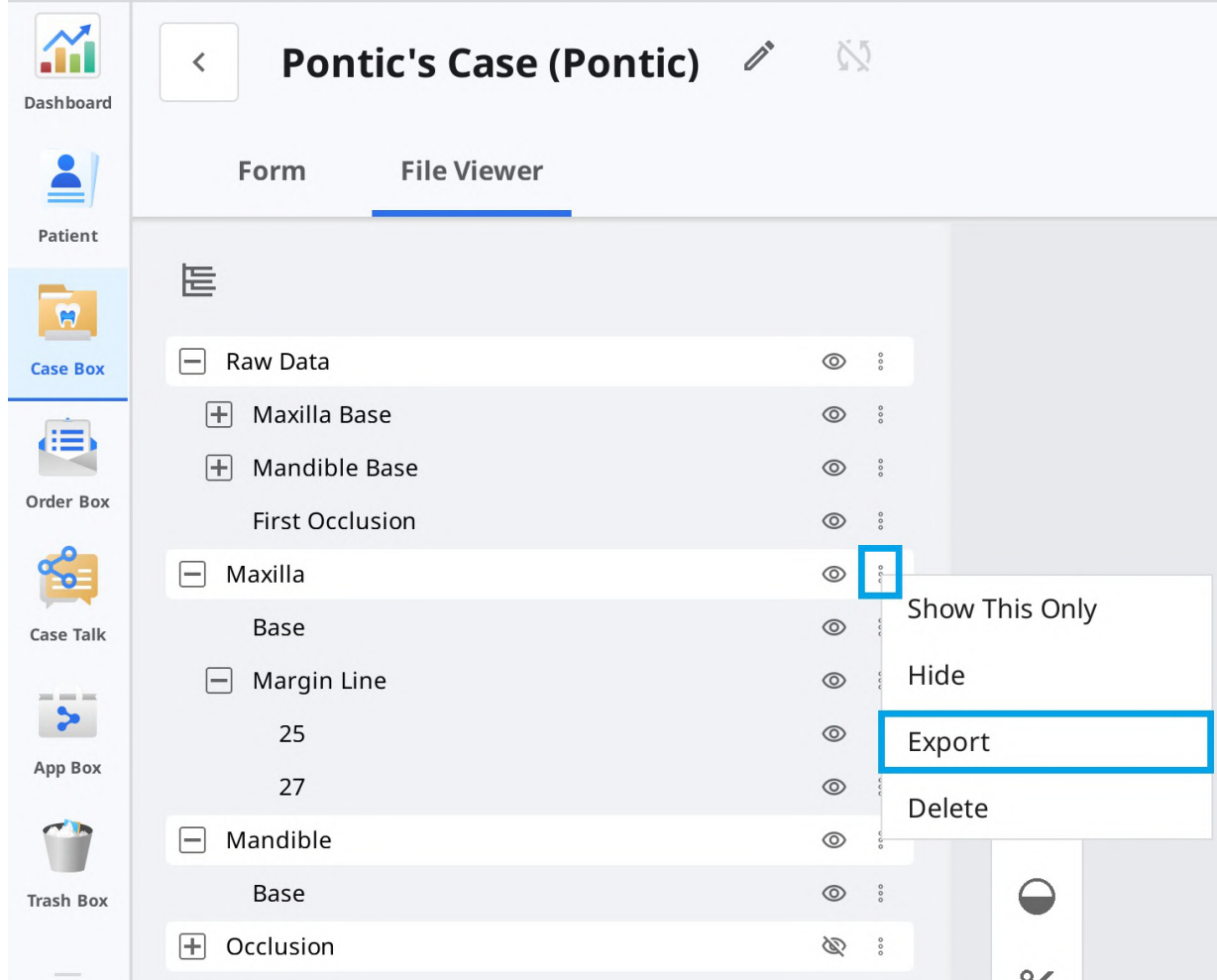

1. Перейдіть до Case Box або Work Box.
2. Натисніть, щоб відкрити проєкт із переліку.
3. Натисніть значок у вигляді трьох точок, розташований поруч із групою даних або об'єктом на дереві даних на вкладці «Переглядач файлів».



4. Натисніть «Експорт».

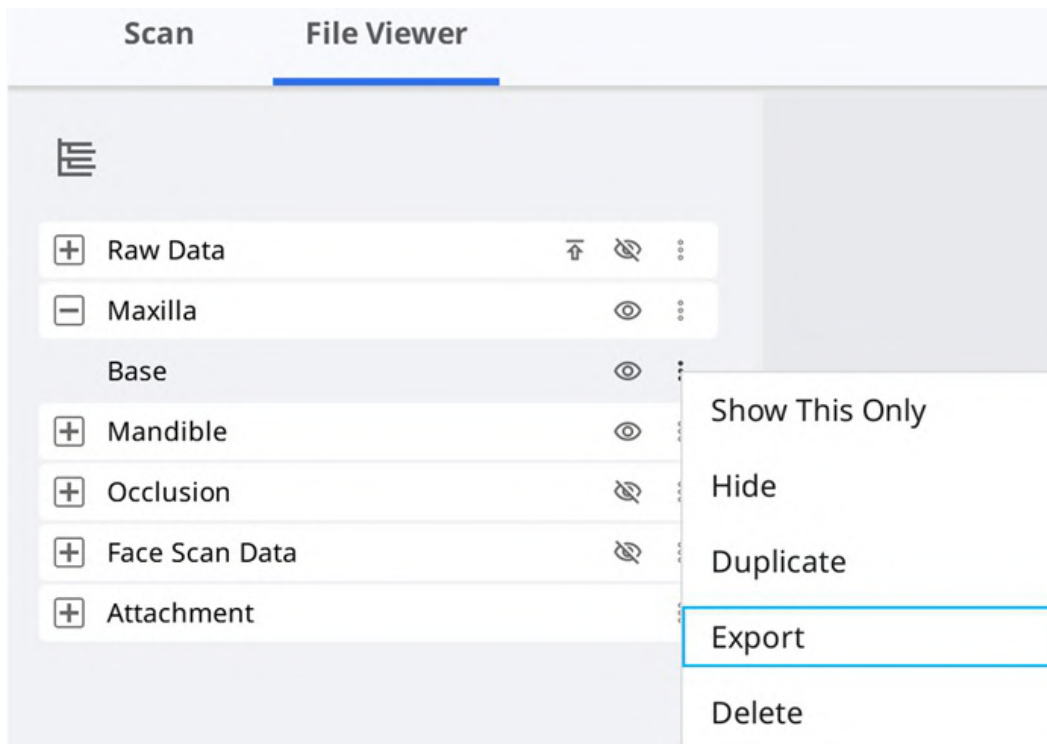

5. Вкажіть папку призначення, ім'я папки, тип файлу, mesh-формат та формат зображень, а також виберіть параметри експорту на вкладці «Параметри».

Export files in case

Options
File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close
Export

6. Ви побачите, що в переліку файлів вибрані лише ті файли, які ви вибрали в дереві даних.

Export Files in This Case

Options **File List**

- ☐ Maxilla
 - ☐ Base
- ☒ Mandible
 - ☒ Base
- ☐ Occlusion
 - ☐ First Occlusion
 - ☐ Second Occlusion
- ☐ Dynamic Occlusion
- ☐ Free
 - ☐ Maxilla
 - ☐ Mandible
- ☐ Face Scan Data
 - ☐ Face Scan Data

Close Export

7. Натисніть «Експорт».

8. Натисніть «Так», щоб відкрити папку, до якої збережено файли.

Question

? Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

Експорт переліку проєктів у форматі CSV

У Medit Link є функція експорту переліку проєктів у форматі CSV.

Ви можете експортувати список проєктів з основною інформацією та легко управляти проєктами.

1. Перейдіть до Case Box, Order Box, In Box або Work Box.
2. Виберіть проєкти, які потрібно експортувати.


MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi Clinic

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - +2

Export Status Selected Cases: 4 2018-01-01-2023-10-24 All All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-19 오전 11:00			
Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:15			
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:10	2023-08-18 오전 9:00		

3. Натисніть «Експорт» і виберіть «Перелік проєктів (як показано)» або «Перелік проєктів (з усіма елементами)».

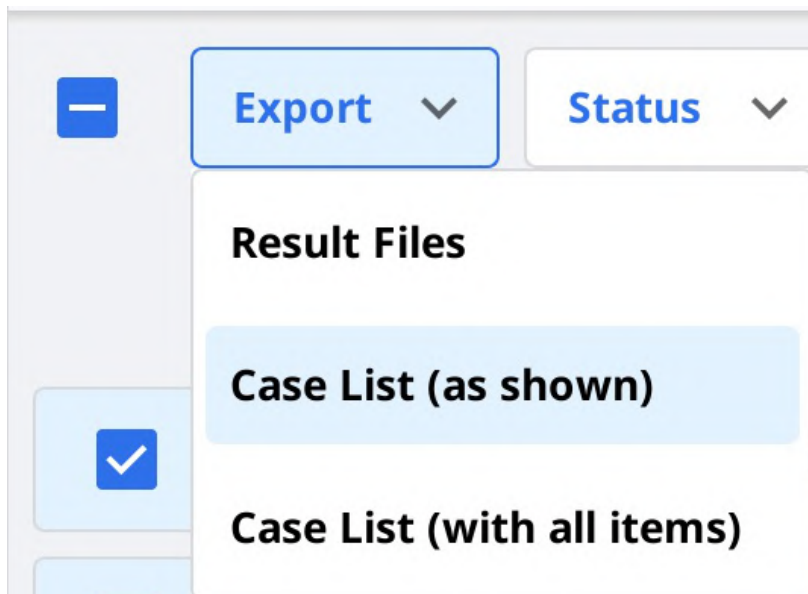

Примітка

Перелік проєктів (як показано) — експорт переліку проєктів з елементами, які зараз показані на екрані. Перейдіть до розділу Опції перегляду > Елементи таблиці, щоб показати або сховати елементи на свій розсуд.

Перелік проєктів (з усіма елементами) — експорт переліку проєктів зі всіма елементами, включно зі статусом, назвою проєкту, датою народження, інформацією форми, датою останньої зміни, датою сканування, датою замовлення й назвою лабораторії.

4. Задайте шлях та ім'я файлу, після чого збережіть перелік.
5. Перелік проєктів буде збережено як файл CSV.

Експорт лінії краю


У Medit Scan for Clinics є функція створення лінії краю, а за допомогою Medit Link лінію краю можна експортувати до програми CAD.

Експорт лінії краю як кольору

Як правило, Medit Link конвертує лінію краю в колір та експортує результат разом із верхньою або нижньою щелепою. Ви можете створити лінію краю у своїй програмі CAD на основі інформації кольору.

Приклад:

Верхня щелепа

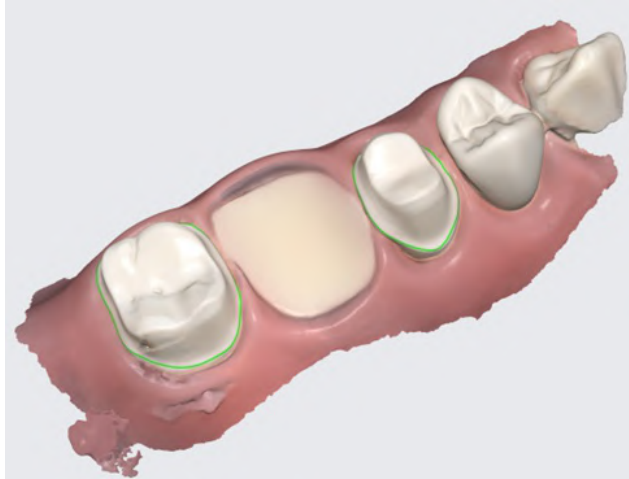

Результатів лініями краю у вигляді інформації кольору

Примітка

Ця функція доступна для форматів, які містять інформацію кольору, таких як meditMesh, OBJ та PLY. Лінію краю не можна конвертувати в формат STL.

Примітка

Тип > 3Share не підтримує цю функцію.


Експорт лінії краю як файлу

У випадку exocad Medit Link експортує лінію краю в файл "~margin.xyz", який можна напряму імпортувати до exocad.

Цей файл можна використовувати в exocad без додаткової роботи.


Приклад:

Верхня щелепа

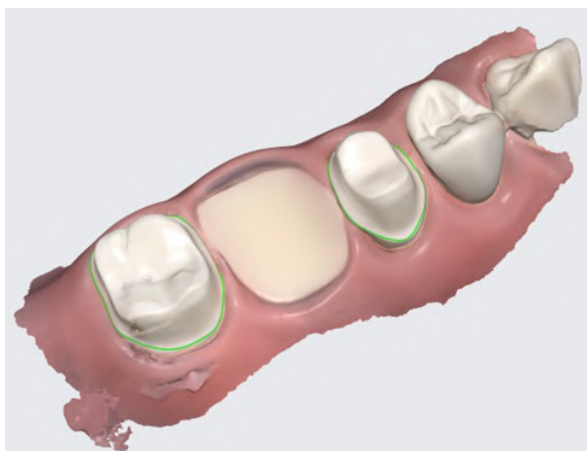

Результатів лініями краю у вигляді інформації кольору

Лінія краю

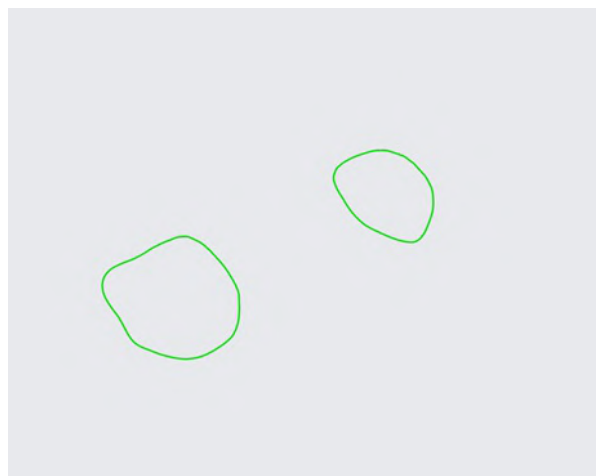

Лінія краю експортована як окремі файли

Завантаження файлів із вебсервісу Medit Link

Medit Link підтримує функцію завантаження файлів.

Щоб отримати файли результатів без встановлення застосунку Medit Link, їх можна завантажити з вебсервісу Medit Link.

Примітка


Для завантаження файлів із вебсервісу вони мають бути передані до Medit Cloud.

Функція завантаження доступна для таких розділів вебсервісу Medit Link:

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box


Кнопка «Завантажити» знаходиться в правому верхньому куті.

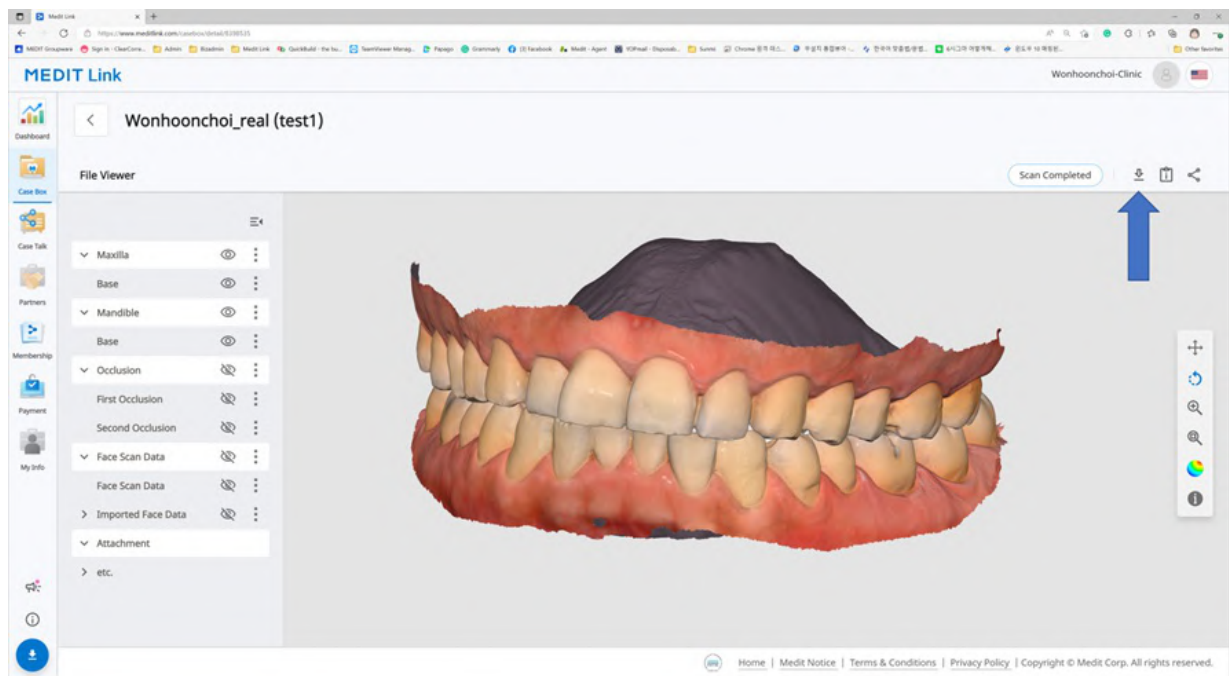

Web Viewer

Коли ви ділитесь проектом за допомогою Case Talk, ви можете вказати, дозволяти завантаження чи ні.

Ви можете встановити прапорець «Надати дозвіл на завантаження» та надати спільний доступ до проекту. Всі користувачі, які отримають доступ до проекту, зможуть завантажити файли.

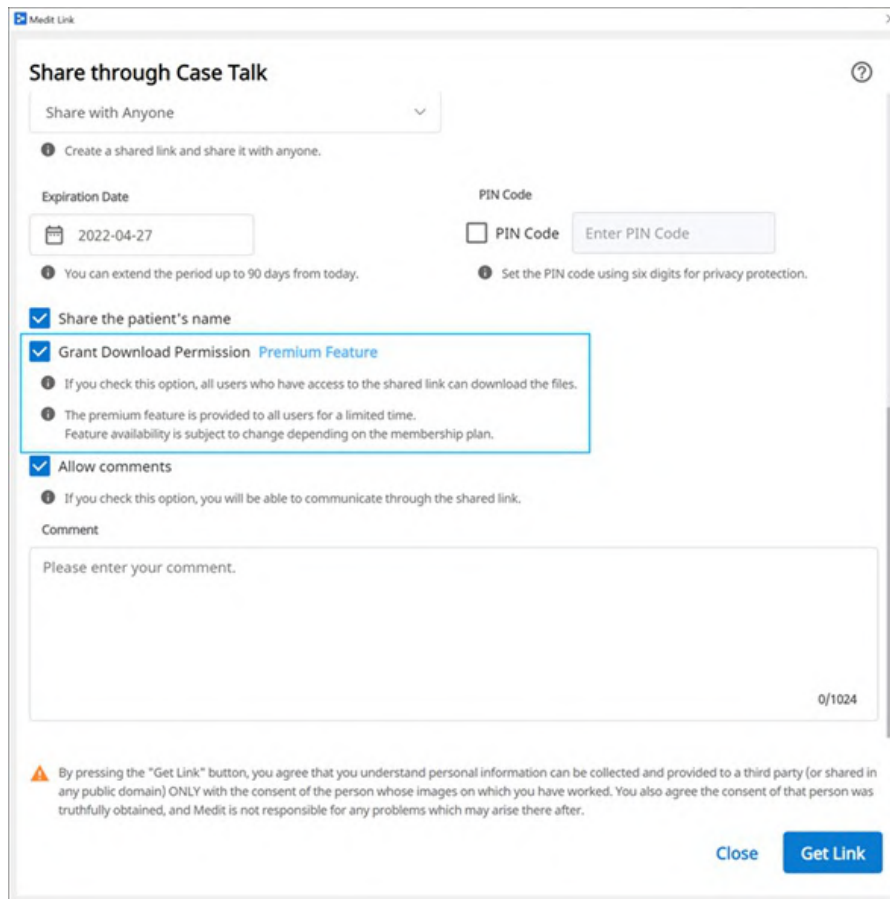

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

У Web Viewer значок «Завантажити» знаходиться в правому верхньому куту.

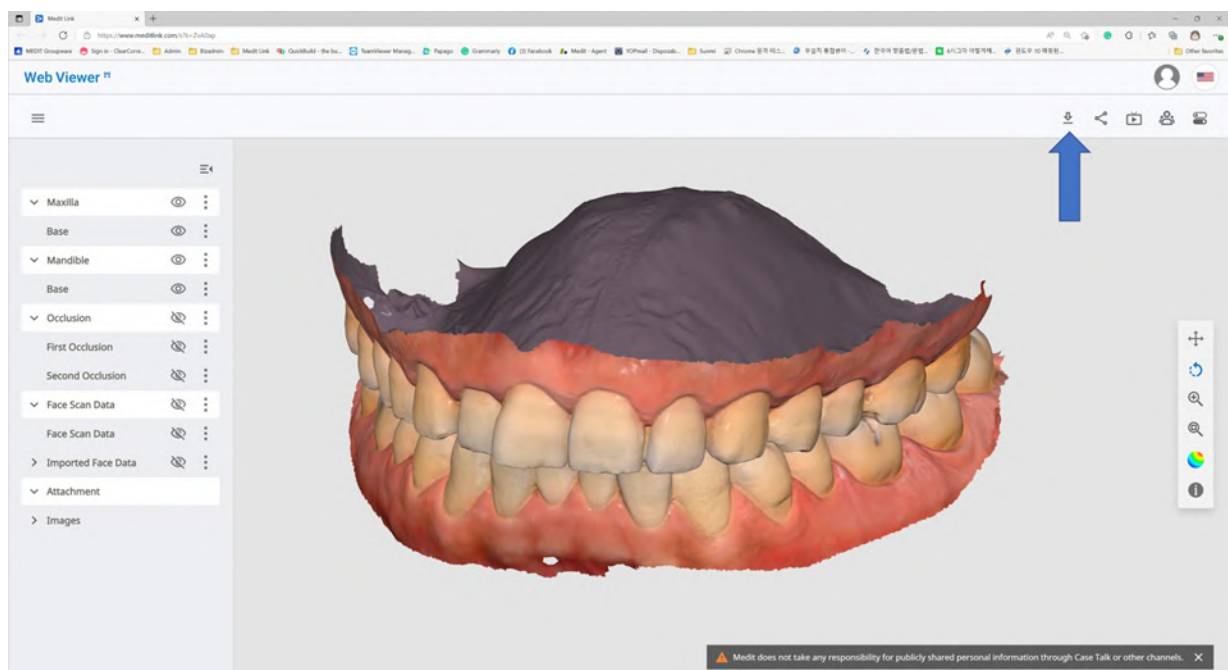

1. Натисніть «Завантажити».



2. Виберіть mesh-формат у діалоговому вікні завантаження.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

3. Натисніть «OK».

Замовлення/керування замовленнями

Ви можете легко зробити замовлення з даними, отриманими з під'єднаних програм та прикріпленими користувачем.

Замовлення проєктів

Ви можете зробити замовлення в партнера за допомогою Case Box.

1. Натисніть кнопку «Замовлення».
2. Перевірте інформацію, потрібну для замовлення.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage

Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK


3. Виберіть партнера.
4. Перевірте інформацію про продукт на вкладці «Перелік замовлення».
 - Вирішіть, чи слід розкривати ім'я пацієнта.
5. Перевірте файли для замовлення на вкладці «Перелік файлів».
6. Введіть бажану дату доставлення.
 - За замовчуванням дата доставлення — через 7 днів після дати замовлення.
7. Ви можете додати примітку та теги для уточнення деталей.
8. Якщо програма сканування сформувала множинні результати оклюзії, всі ці результати можна

надіслати одразу, встановивши прапорець «Замовити всі оклюзійні відносини».

9. Продовжте оформлення замовлення.


Підтвердження замовлення (In Box)

- Прийміть замовлення після його отримання.
- Прийняті замовлення перенаправляються до Work Box.

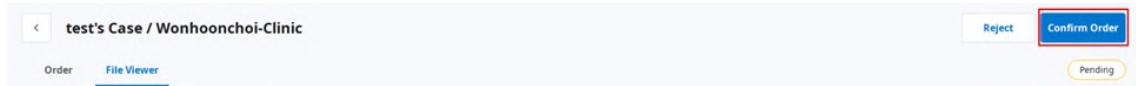


Скасування замовлення (Order Box)

- Ви можете скасувати замовлення до того, як воно буде прийняте вашим партнером.
- Скасовані замовлення можуть бути замовлені знов.

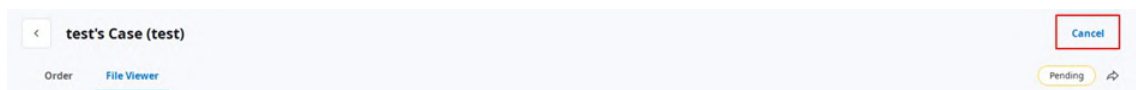


Відхилення замовлення (In Box)

- Ви можете відхилити отримане замовлення.
- Відхилені замовлення можуть бути замовлені знов.

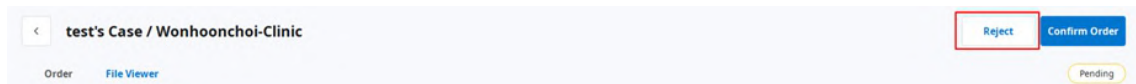

Перегляд замовлених проєктів

Деталі замовленого вами проєкту можна переглянути в Order Box в обліковому записі клініки. Також отриманий проєкт можна подивитися в In Box в обліковому записі лабораторії.

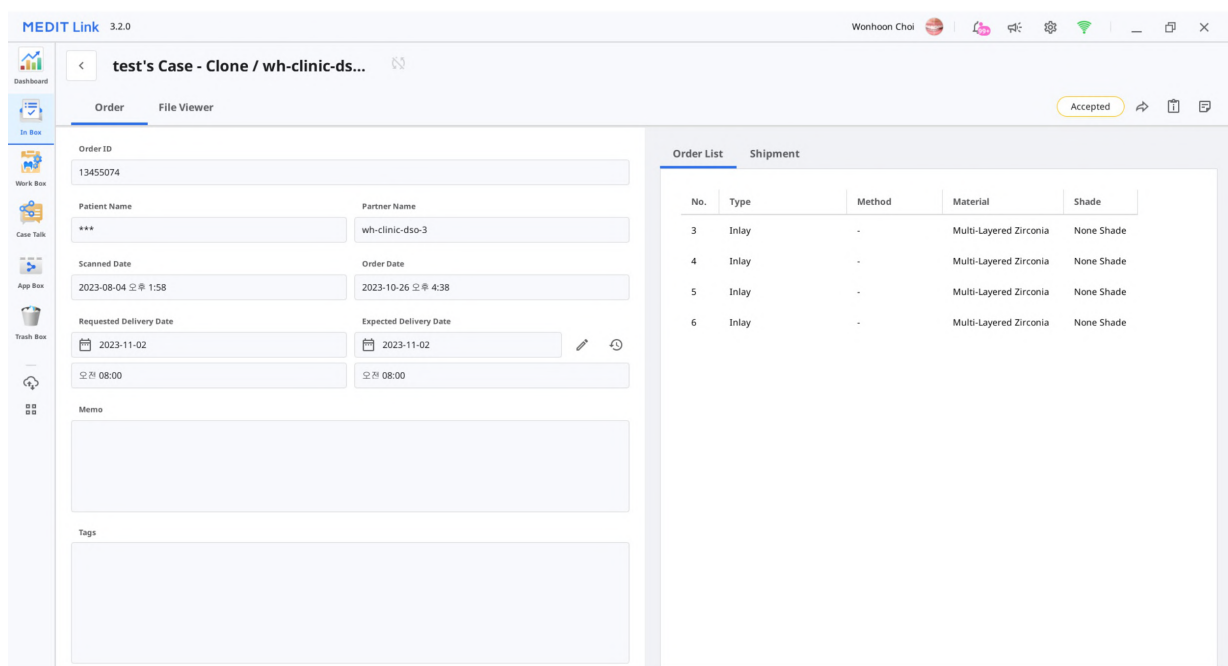

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Інформація про замовлення	Інформація, яку можна включити до замовлення: ідентифікатор замовлення/ім'я пацієнта/ім'я облікового запису/дата сканування/дата замовлення/дата доставлення/крайній термін доставлення/примітка. Ви можете перевірити деталі замовленого продукту та підтвердити інформацію про доставлення.
Перелік замовлення	В переліку замовлення показуються деталі замовленого продукту.
Доставлення	Введення/перевірка інформації про доставлення.

Введення інформації про доставлення (In Box)

Введіть інформацію про доставлення для завершеного проекту та почніть процес доставлення.

1. Відкрийте вкладку «Доставлення».
2. Введіть інформацію про доставлення та натисніть «Зареєструвати».

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Введену інформацію буде надіслано вашому партнеру.

Керування датою доставлення

Ви можете вказати очікувану дату доставлення під час розміщення замовлення, і цю інформацію буде надіслано вашому партнеру.

Вказування запитаної дати доставлення (обліковий запис клініки)

- Під час замовлення через Case Box ви можете ввести запитану дату доставлення.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- За замовчуванням дата доставлення — через 7 днів після дати замовлення.
- Введіть дату/час, коли ви хочете отримати продукти, та продовжте оформлення замовлення.
- Ви можете легко встановити час за допомогою повзунка.

Вказування очікуваної дати доставлення (обліковий запис лабораторії)

- Ви можете ввести очікувану дату доставлення для проєкту, замовленого в In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order List Shipment

Order ID
10413603

Patient Name
test

Partner Name
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date
2022-09-29 오전 7:56

Order Date
2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Expected Delivery Date
2022-10-01 오전 10:30

Memo
<Scanbody Library>
16: ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
15: ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
14: ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0


1. Перевірте запитану дату доставлення та натисніть «Редагувати», щоб ввести нову дату доставлення.



2. Введіть очікувану дату доставлення, виходячи з фактичних робочих днів. За потреби ви можете

залишити коментар.

3. Натисніть «Застосувати».

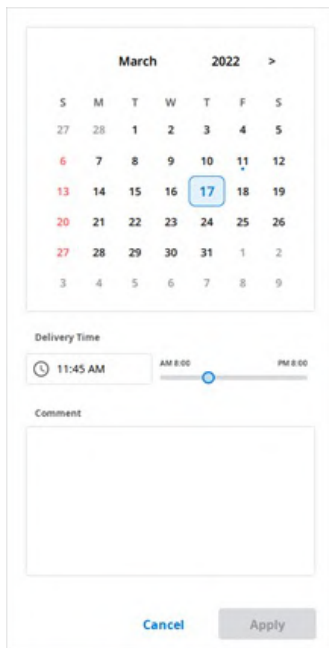

The screenshot shows a mobile app interface. At the top, there is a calendar for March 2022. The date 17 is selected and highlighted with a blue circle. Below the calendar, there is a section labeled 'Delivery Time' with a clock icon and a time picker set to 11:45 AM. A slider below the time picker ranges from AM 8:00 to PM 8:00. Below the time picker, there is a section labeled 'Comment' with a text input field. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'Apply'.

4. Очікувана дата доставлення та примітка будуть надіслані разом із замовленням.

- Ви можете переглянути дату та примітку в Order Box.
- Ви можете змінити очікувану дату доставлення, і зміни будуть надіслані вашому партнеру.

5. Ви можете переглянути історію проєкту за допомогою кнопки «Історія».



Завершення проєкту

Завершення проєкту (Work Box/In Box)


Після виконання всіх завдань натисніть «Готово», щоб завершити проєкт.

Завершення проєкту за допомогою значка «Деталі проєкту»

Значок із трьома точками знаходиться праворуч від кнопок «Відкрити» або «Сканувати заново».




Завершіть роботу, натиснувши цей значок та вибравши «Готово».

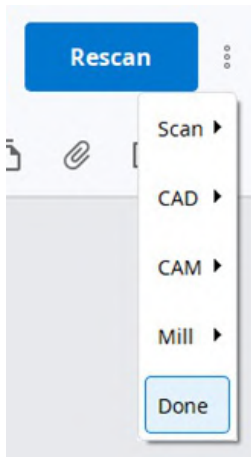

Завершення декількох проєктів із переліку проєктів

1. Перейдіть до Work Box.
2. Виберіть усі проєкти, які потрібно завершити.

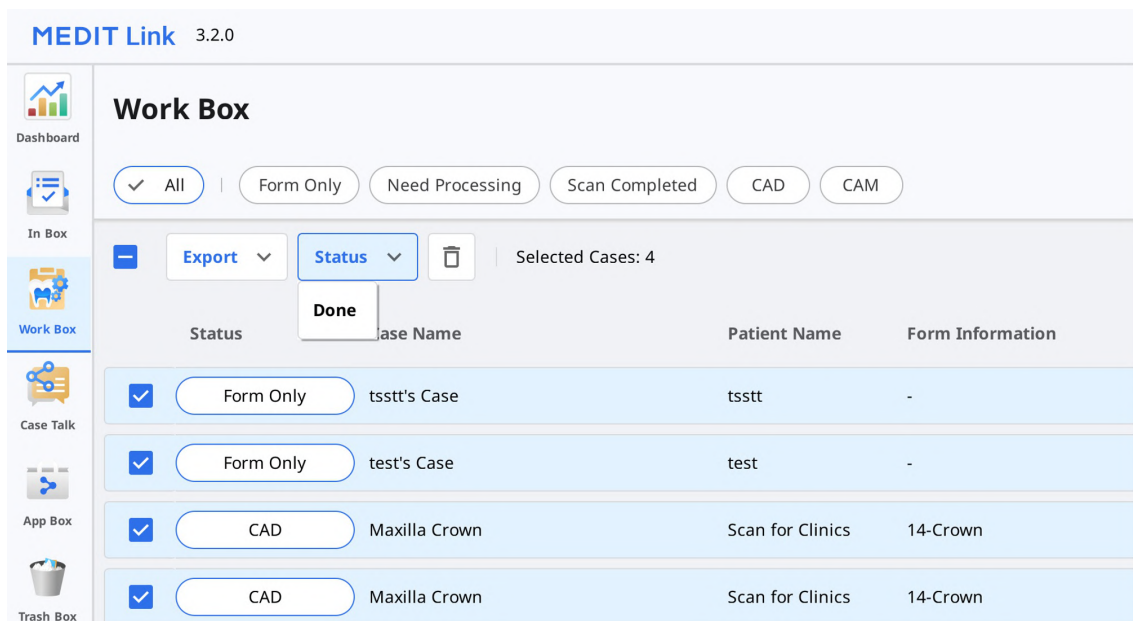


3. Натисніть «Статус» та виберіть «Готово».

Завершення проєкту (Case Box/Order Box)

Після завершення проєкту зі сторони лабораторії клініка має підтвердити завершення всього процесу замовлення.

Якщо лабораторія завершила свою роботу, клініка побачить кнопку «Підтвердити доставлення» в Order Box.

Натисніть її, щоб підтвердити завершення замовлення, і статус замовлення буде змінено на «Case Completed».

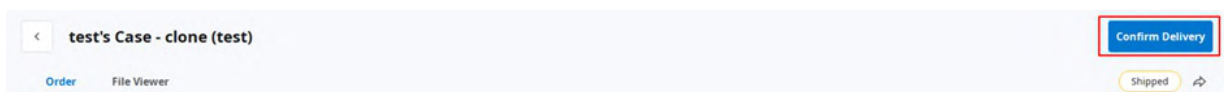

Завершення проєкту, який не було замовлено, в Case Box

Проекти, які не були замовлені в лабораторії, можна завершити в Case Box.

1. Перейдіть до Case Box.
2. Виберіть проєкт, який потрібно завершити.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Patient

✓ All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered

Cas

Export

Status

Selected Cases: 4

Case Completed

Status	Case Name
☐ Ordered test	test's Case
☒ Scan Completed wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case
☒ Scan Completed test test(1234)	G11598492310180503424
☒ Scan Completed test	test's Case
☒ Scan Completed test	test's Case

3. Натисніть «Статус» та виберіть «Case Completed».

Комунікація за допомогою тегів

Теги дозволяють додавати інформацію до проєктів та замовлень, які ви надсилаєте партнерам.

Додання тегів під час створення нового проєкту

Ви можете вводити теги під час створення нового проєкту або редагування інформації про проєкт.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

Можна легко шукати та вибирати теги, які ви використовували раніше.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

Додавання тегів під час оформлення замовлення

Перевіряйте та редагуйте теги у діалоговому вікні «Замовлення» під час оформлення замовлення.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
(02835) 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

AM 8:00 오전 8:15 PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Перегляд тегів в деталях проєкту

