

USER GUIDE

Medit Link (Revision 9) 2024.04



Table of Contents

Medit Link

Introductie	7
Medit Link	7
Overzicht van de dienst	7
Clouddienst	8
Workflowbeheer platform met ordersysteem	8

Medit Link > Installatie

Systeemvereisten	9
Systeemvereisten voor Windows	9
Systeemvereisten voor macOS	9
Systeemvereisten voor Web Service	9
Aanbevolen voor browsers	9
Minimum voor mobiele apparaten	9
Installatie op Windows	10
Installatie op macOS	13

Medit Link > Aan de slag

Aanmelden en inloggen	17
Medit Link Website	17
Aanmelden	17
Login en welkomspagina	19

Medit Link > Medit Link Web

Dashboard	21
Dashboard overzicht	21
Medit Insights	21
Abonneer op Medit Insights	22
Uitschrijven voor Medit Insights	23
Patient	24
Patiënt zoeken	24
Case Box/Work Box	25
Dossiers filteren	25
Op patiënt filteren	25
Filter op status	26
Filter op duur	27
Filter op zoekopdracht	27
Dossierdetails	27
Order Box/In Box	29
Orderdetails	29
Tabbladen in Order Box/In Box	29
Case Talk	30
Een Case Talk aanmaken	30
Het type toestemming voor delen en de opties voor delen instellen	31
Case Talk details	33
Web Viewer	33
Annotatie	34
Opmerkingen	35

Realtime scherm delen	36
Gegevensboom	36
Gegevensboom beheren	36
3D-model beheren	37
Partners	38
Zoek naar partners	38
Mijn partnerlijst	38
Partner uitnodigen	39
Membership	40
Lidmaatschap	40
Plan	40
Cloudopslag	41
Abonneren	42
Opzeggen	43
Betalingsinformatie	44
Een betaalmethode toevoegen	45
Een betaalmethode wijzigen	46
Inwisselen	47
Registreer actiecode	47
Activeer actiecode	48
My Info	49
Mijn account	49
Mijn praktijk/Mijn lab (Alleen beheerdersaccount)	49
Mijn scanner	50
Ander menu	51
Mededeling en update	51
Gerelateerde websites	51
Download Medit Link App	51

Medit Link > Medit Link App

Overzicht	53
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de beschikbare menu's in elk type praktijk en laboratorium account	53
Titelbalk	54
Mijn informatie	54
Meldingen	54
Mededeling & update	55
Instellingen	55
Netwerkstatus	56
Instellingen	58
Algemeen	58
Opslagbeheer	59
Periode instellen	60
Lokale opslag	60
Cloudopslag	60
Stel verbonden programma in	61
Export opties	61
Dossier omzet instrument	63
Dossier exporteren	64
Dossier importeren	65
Proxy-opties	66
Over	67
Gebruikershandleiding	67
Menu	68

Dashboard	68
Patient	68
Nieuwe patiënt toevoegen	69
Patiënt wissen	69
Patiënten samenvoegen	69
Case Box/Work Box	70
Tabbladen in Case Box/Work Box	70
Functies in Case Box/Work Box	71
Order Box/In Box	72
Tabbladen in Order Box/In Box	73
Case Talk	73
App Box	74
Alle	74
Medit Apps	74
Gedownload	75
Trash Box	75
Dossier synchronisatiebeheerder	75
Uploaden	76
Downloaden	76
Gerelateerde websites	77
Bestandenbekijker	78
Gegevensboom	78
Instrumenten voor modelcontrole	78
3D-model beheren	78
2D-afbeeldingen beheren	79
Functie-instrumenten	80
Beeldopname en notitie	80
Ortho-opname	80
Gaten vullen	81
Bijknippen	82
Optimaliseer occlusie-uitlijning	84
Onderkaakbeweging	85
Beheer Multi-occlusiegegevens in Bestandenbekijker	86
Meerdere resultaten beheren	86
Weergaveopties	88
Statusfilters	88
Weergavetype	89
Groeperen	89
Sorteren	89
Filteren en zoeken	91
Op patiënt filteren	91
Op datum filteren	92
Geavanceerde zoekmogelijkheden	92

Medit Link > Workflow

Dossier aanmaken/wijzigen/kopiëren/verwijderen	94
Dossiers aanmaken	94
Dossiers aanmaken in Case Box (clinic)	94
Dossier aanmaken in Work Box (Lab)	95
Dossiers bewerken	95
Dossiers bewerken in Case Box (Clinic)	95
Dossier bewerken in Work Box (Lab)	96
Dossiers kopiëren	97

Dossiers kopiëren in Case Box (Clinic)	97
Dossier kopiëren in Work Box (Lab)	97
Dossier wissen	98
Dossier wissen (Clinic en Lab)	98
Formulierinformatie	99
Formulierinformatie registreren in Case Box	99
Voer in op het tabblad Formulier	99
Formulierinformatie registreren in Work Box	99
Voer in op het tabblad Formulier	99
Tanden verbinden tot brug	99
Scanopties instellen	100
Medit Scan for Labs	100
Algemene opties	100
Opties per tand	100
Aan favorieten toevoegen	100
Aan favorieten toevoegen	100
Favoriete sjablonen beheren	101
Werken aan scannen/CAD	102
Scanproces	102
CAD-proces	102
Add-in apps gebruiken	102
Invoegtoepassing Quick Launcher	102
App launcher beheer	102
Quick Launcher	103
Alle apps	103
Resultaatbestanden krijgen	104
Bestanden met scanresultaten exporteren	104
Resultaatbestanden exporteren vanuit de dossierlijst	105
Resultaatbestanden exporteren vanuit Bestandenbekijker	106
Resultaatbestanden exporteren vanuit de Gegevensboom	108
Dossierlijst exporteren als CSV	110
Marginale lijn exporteren	111
Exporteer marginale lijn als kleur	111
Exporteer marginale lijn als bestand	111
Bestanden van Medit Link Web downloaden	112
Case Box/Work Box	112
Web Viewer	113
Dossiers bestellen/beheren	115
Dossiers bestellen	115
Order bevestigen (In Box)	115
Order annuleren (Order Box)	116
Order afwijzen (In Box)	116
Bestelde dossiers controleren	116
Verzendinformatie invoeren (In Box)	116
Bezorgdatum beheren	117
De aangevraagde bezorgdatum instellen (Clinic-account)	117
De verwachte bezorgdatum instellen (Laboratorium-account)	118
Dossier voltooien	119
Voltooien (Work Box/In Box)	119
Voltooi een dossier vanuit de dossierdetails	119
Voltooi meerdere dossiers vanuit de dossierlijst	119
Voltooi (Case Box/Order Box)	119
Voltooi een niet-besteld dossier in de Case Box	120

Communiceren met behulp van tags	121
Voeg tags toe bij het aanmaken van een nieuw dossier	121
Voeg tags toe bij het bestellen	122
Controleer tags voor dossierdetails	122

Introductie

Medit Link

Medit Link is een hulpmiddel voor samenwerking dat is ontworpen om de communicatie tussen praktijken en laboratoria te vergemakkelijken, zodat voor elke partij een optimale workflow ontstaat.

Het biedt verschillende functies op basis van het type account en de bijbehorende machtigingen. Het programma biedt een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface voor het beheer van de workflow, van het scannen met mond- en modelscanners tot het bestellen van dossiers, en van het ontwerpen tot het produceren van prothesen.

Medit Link bestaat uit een webdienst en een computerapplicatie.

Overzicht van de dienst

		Web	App
		• Het account registreren en beheren • Partners zoeken en beheren • Deel dossiers via Web Viewer met een deelbare link • Krijg toegang tot dossiers die in de app zijn gemaakt • Bestellingen beheren	• Voer formulierinformatie in • Scannen • Bestellingen beheren • Verbind met CAD • Patiënten beheren
Praktijk	Beheerder	Zoek en beheer partners en uw praktijken, en deel dossiers. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Voer formuliergegevens in, scan, plaats bestellingen en beheer patiënten. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Member	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Laboratorium	Beheerder	Zoek en beheer partners en uw laboratorium, en deel dossiers. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Voer formulierinformatie in, scan en beheer bestellingen. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Member	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Clouddienst

Medit Link ondersteunt het automatisch uploaden/downloaden van databases en bestanden via AWS (Amazon Web Services).

De in de cloud opgeslagen gegevens worden automatisch gesynchroniseerd met de computers van meerdere gebruikers binnen de organisatie, zodat ze vanaf elke computer op elk moment toegang hebben tot dezelfde gegevens. Dankzij back-up en herstel in de cloud zijn al uw gegevens veilig. Het houdt uw gegevens veilig, zelfs in het geval van gegevensverlies als gevolg van een plotselinge computerstoring.

Met de clouddienst kunnen tandartsen en laboratoria die samenwerken snel gegevens delen zonder dat ze de scans per e-mail hoeven te verzenden of handmatig moeten overbrengen. Alle gegevens, inclusief patiëntinformatie, worden veilig gecodeerd, opgeslagen en verzonden. Medit voldoet aan medische wet- en regelgeving zoals HIPAA en AVG.

Workflowbeheer platform met ordersysteem

Medit Link biedt een bestelsysteem.

- Met Medit Link kunnen gebruikers samenwerkingsverbanden opzetten tussen tandartsen en tandtechnische laboratoria, waarbij gegevens snel en eenvoudig gedeeld kunnen worden.
- Controleer en beheer de orderstatus.

Systeemvereisten

Opmerking

Raadpleeg de systeemvereisten voor Medit Scan for Clinics en Medit Scan for Labs als u de scansoftware met uw scanner wilt gebruiken.

Systeemvereisten voor Windows

	Laptop en Desktop
CPU	Intel Core i5 2,6 GHz of hoger
RAM	16 GB of hoger
Grafische kaart	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) of hoger / of gelijkwaardige AMD-videokaart
Besturingssysteem	Windows 10 64 Bit (niet beschikbaar in 32 Bit) of hoger

Systeemvereisten voor macOS

	Mac
Processor	M1 met 8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine
RAM	16 GB of hoger
Besturingssysteem	Monterey 12 of later

Systeemvereisten voor Web Service

Aanbevolen voor browsers

	Browsers
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimum voor mobiele apparaten

	Android	iOS
Apparaat	Gelijkwaardige aan Galaxy S7 of hoger	Gelijkwaardige aan iPhone 7 of hoger
Besturingssysteem	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB of hoger	2 GB of hoger
AP	Boven Snapdragon 710	A10 Fusion


Installatie op Windows

Medit Link wordt als pakket geïnstalleerd met scanverwervingsprogramma's - Medit Scan for Clinics en Medit Scan for Labs.


1. Voer Medit_LinkSetup.exe uit.
2. Selecteer een taal voor de installatie.
3. Selecteer de map voor de installatie van Medit Link. Lees en ga akkoord met de licentievoorwaarden en klik op "INSTALLEREN".

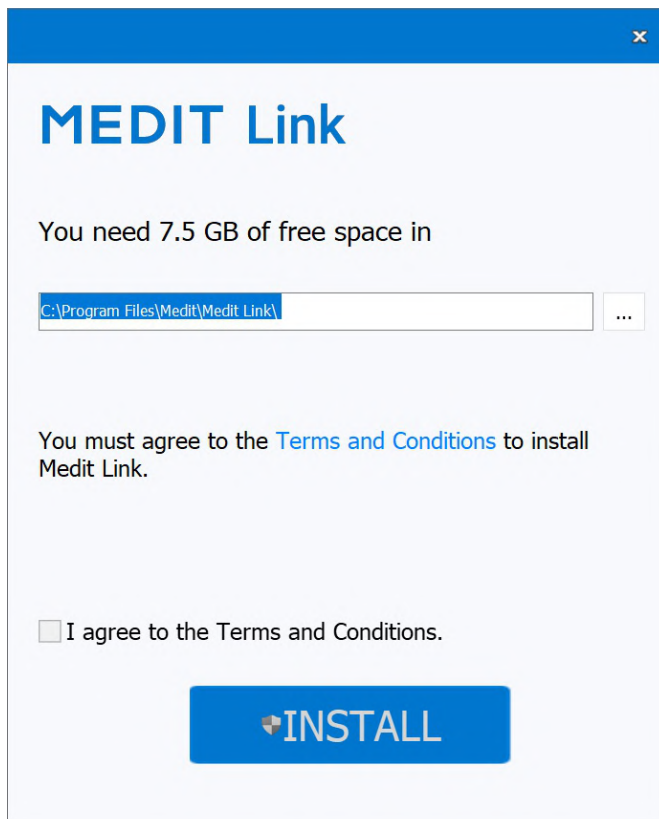

4. Zorg ervoor dat de scannerkabel is losgekoppeld van de computer voordat u doorgaat naar de volgende stap. De installatie kan niet worden uitgevoerd als de scanner op uw pc is aangesloten.
5. Het programma wordt automatisch geïnstalleerd. Dit kan enkele minuten duren. Schakel uw pc niet uit en haal de stekker niet uit het stopcontact voordat de installatie is voltooid.

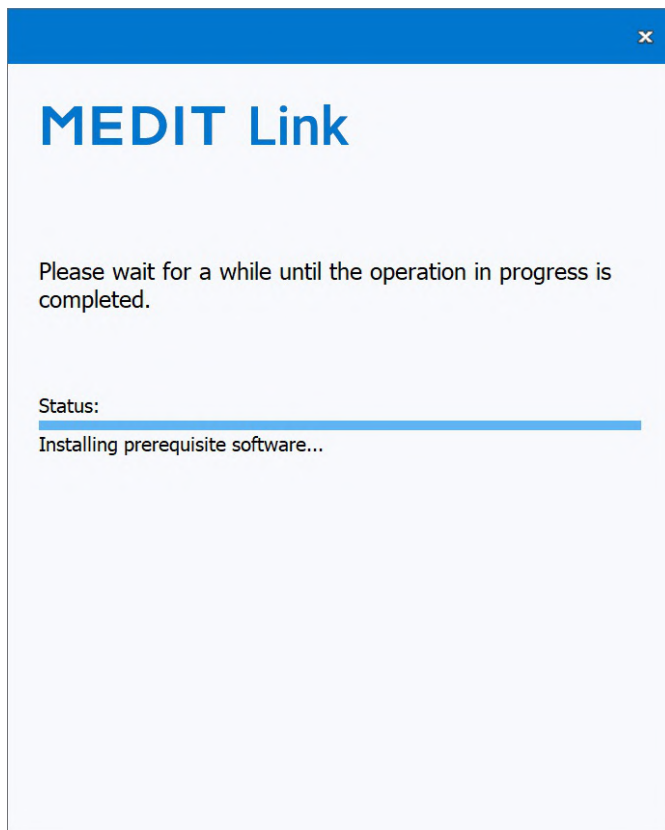

6. Start uw pc opnieuw op nadat de installatie is voltooid. U kunt doorgaan zonder de pc opnieuw op te starten als u niet over de scanner beschikt.

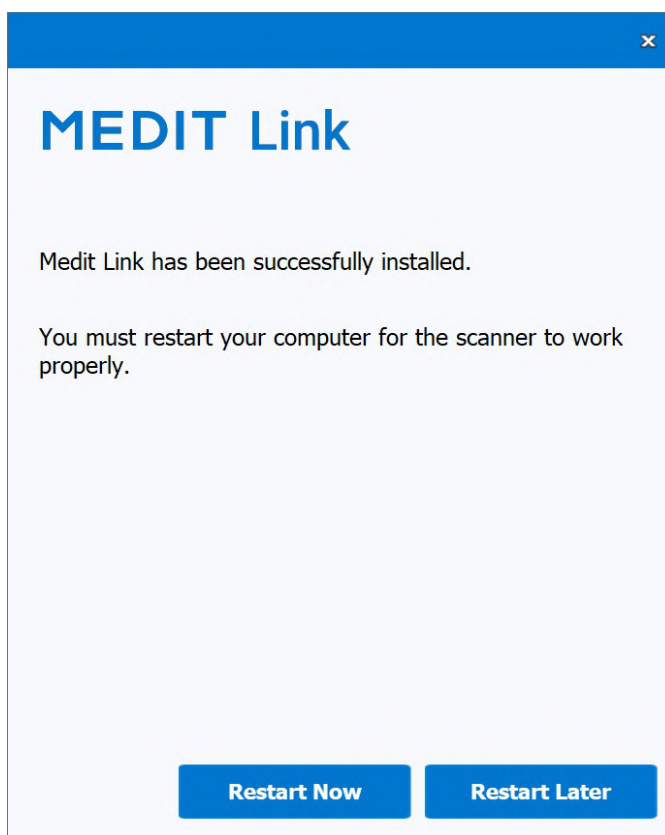


Opmerking

Als u uw pc niet opnieuw opstart nadat de installatie is voltooid, werkt de scanner mogelijk niet goed.


Installatie op macOS

Medit Link wordt als pakket geïnstalleerd met Medit Scan for Clinics.


1. Voer Medit_Link_x.x.x.pkg uit en klik op "Doorgaan".

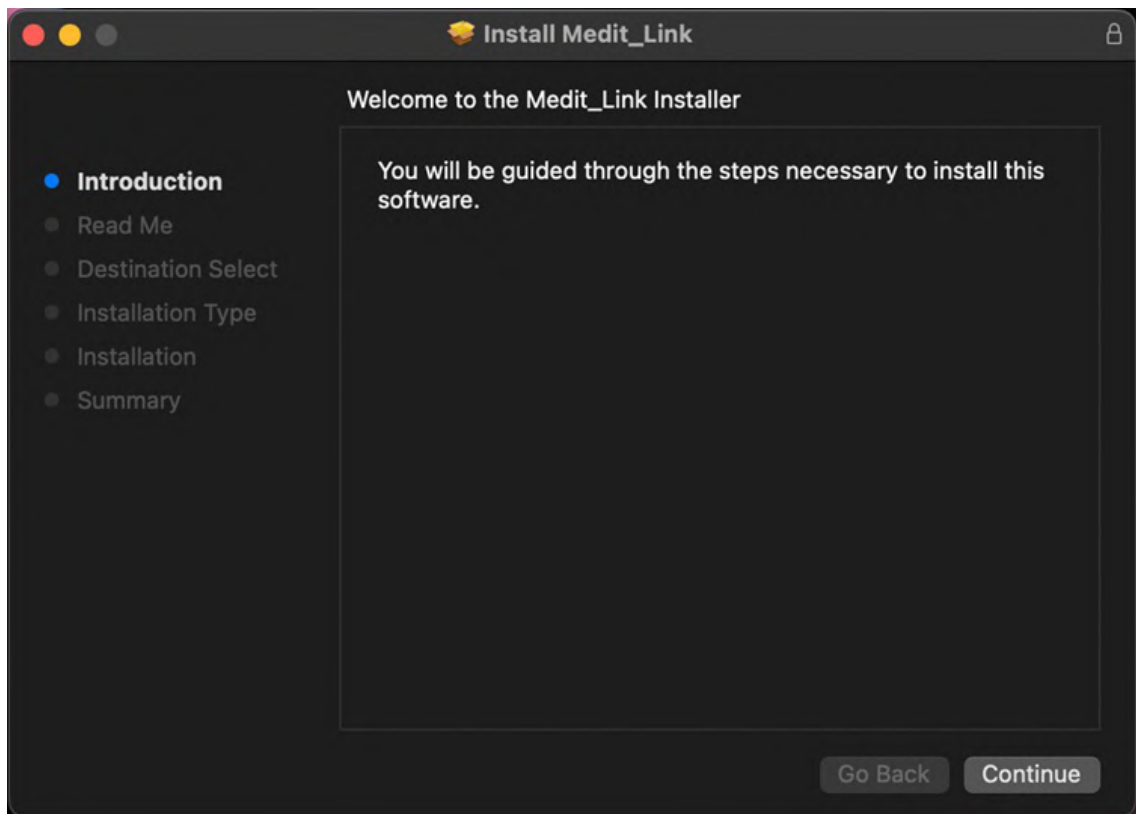


2. Lees de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en klik op "Doorgaan".

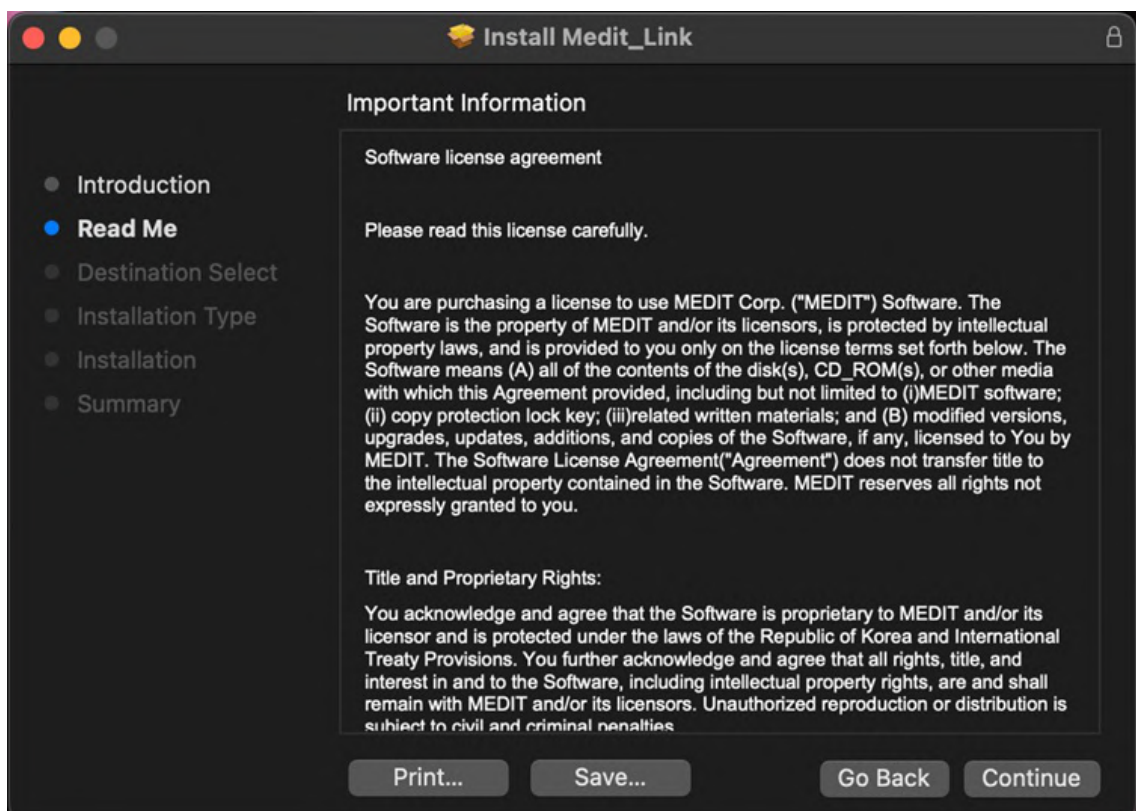


3. Selecteer de schijf voor installatie en klik op "Doorgaan".

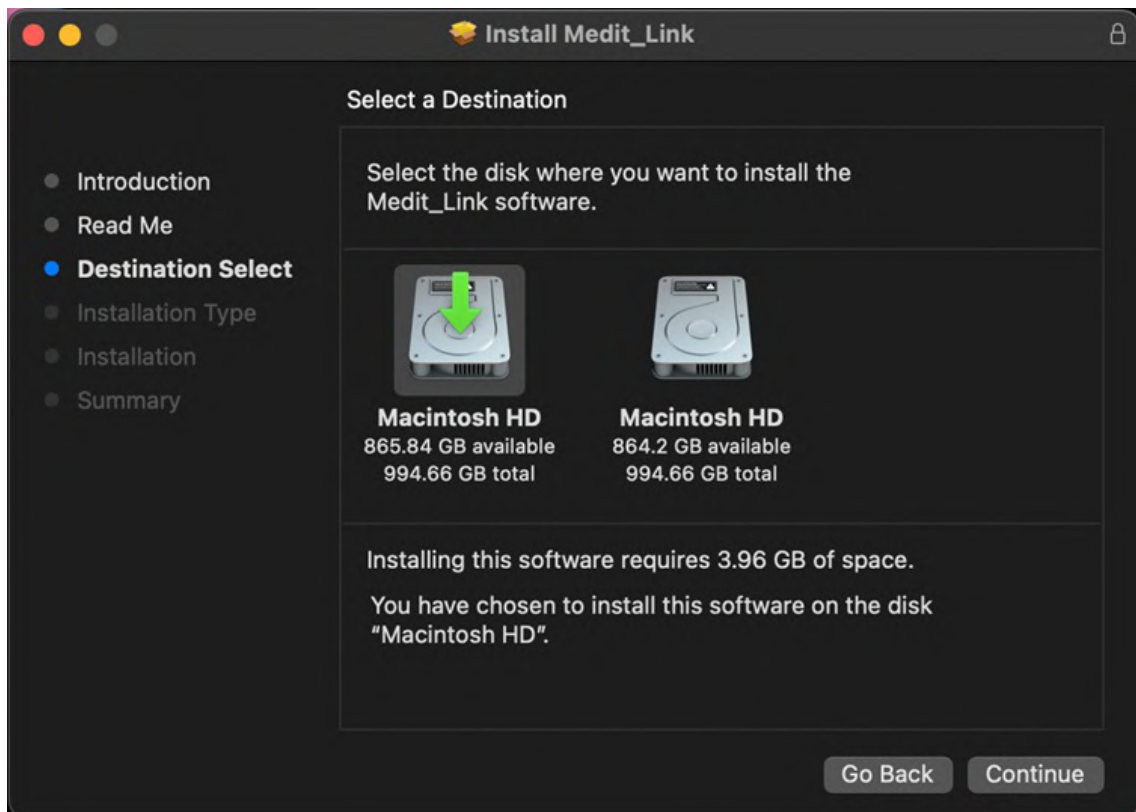


4. Klik op "Installatielocatie wijzigen..." om de installatiebestemming te wijzigen.

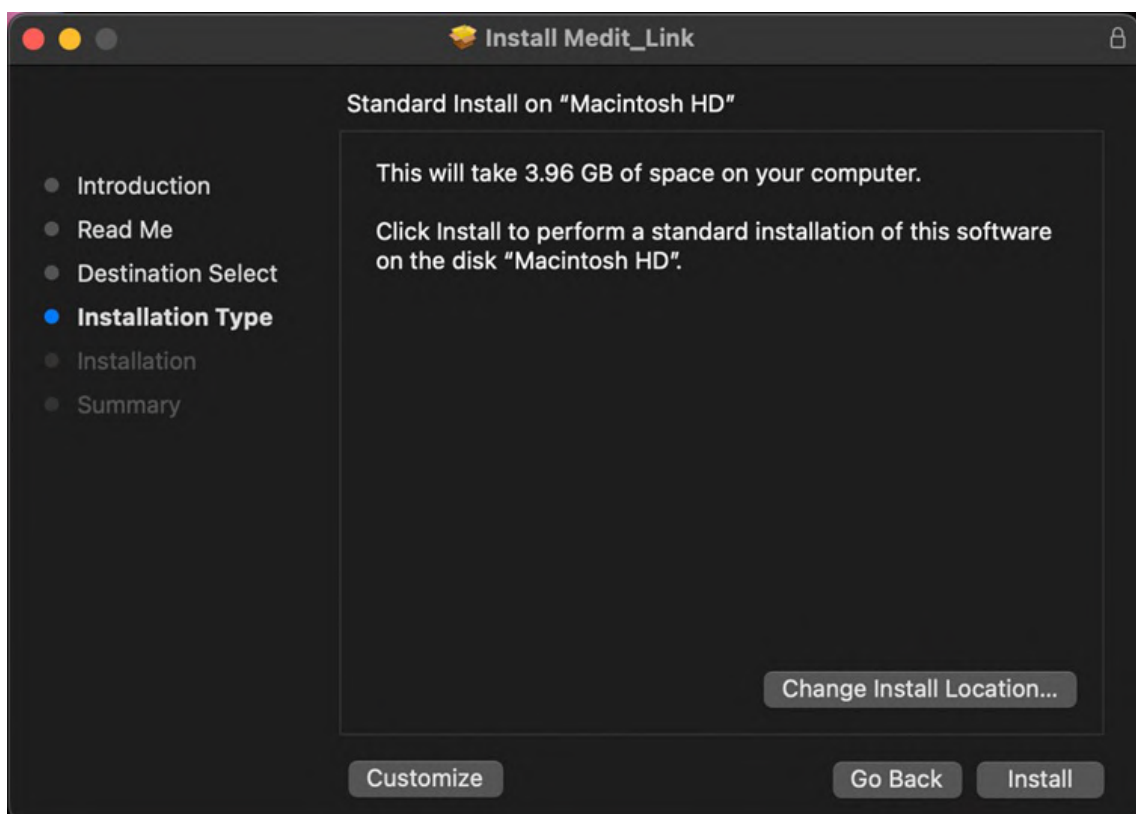


5. Klik op "Installeren" en typ uw Mac-wachtwoord om de installatie toe te staan indien daarom wordt gevraagd.

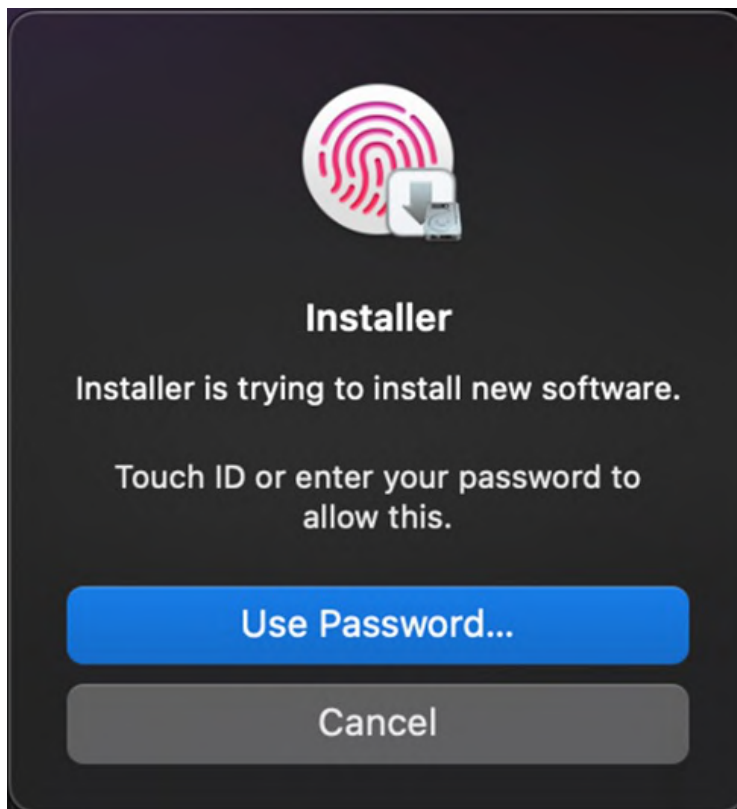

6. Wacht tot de installatie is voltooid.

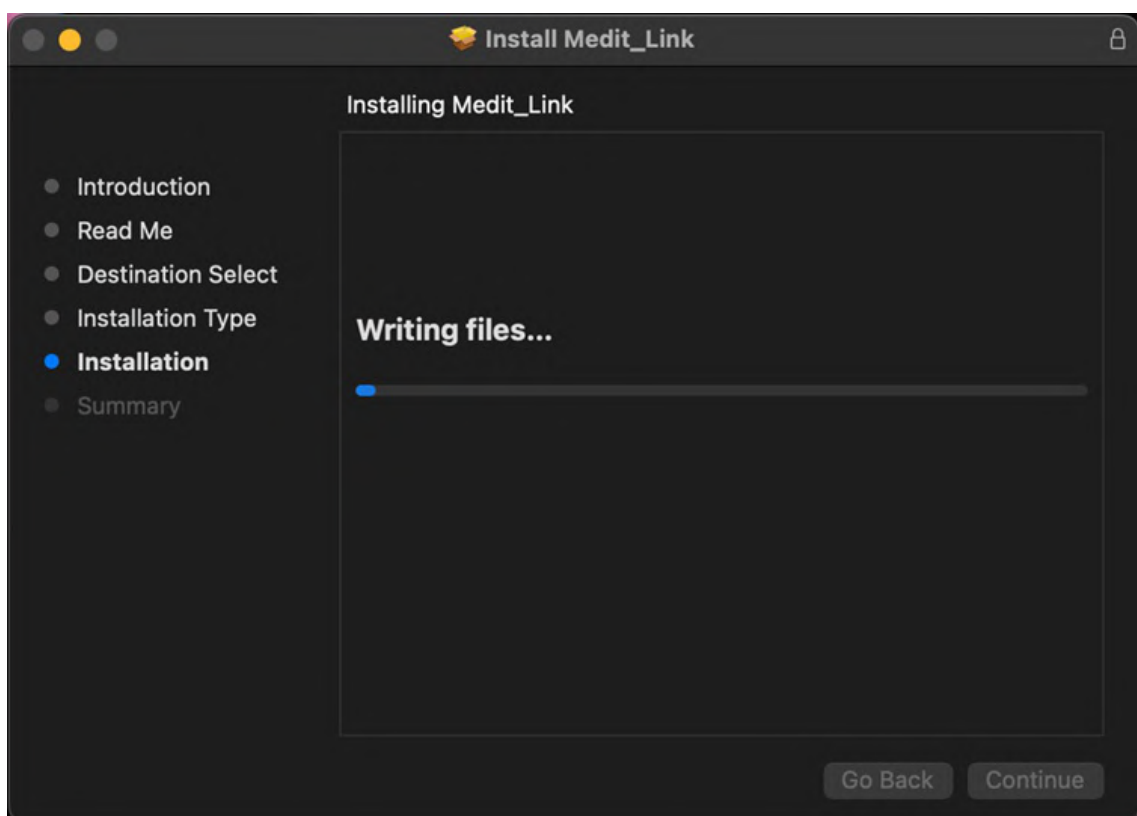


7. Klik op "Sluiten" om het installatievenster af te sluiten.

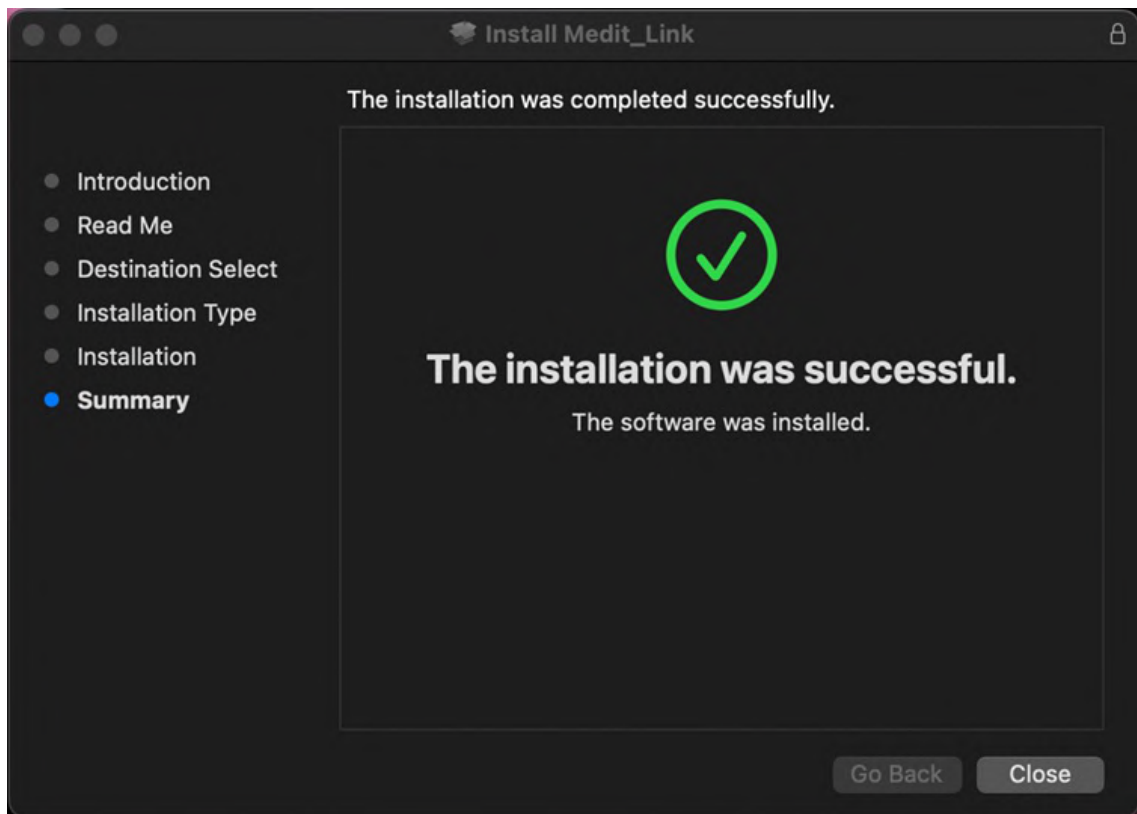

Aanmelden en inloggen

Medit Link Website

Meld u aan voor de Medit Link service op www.meditlink.com.

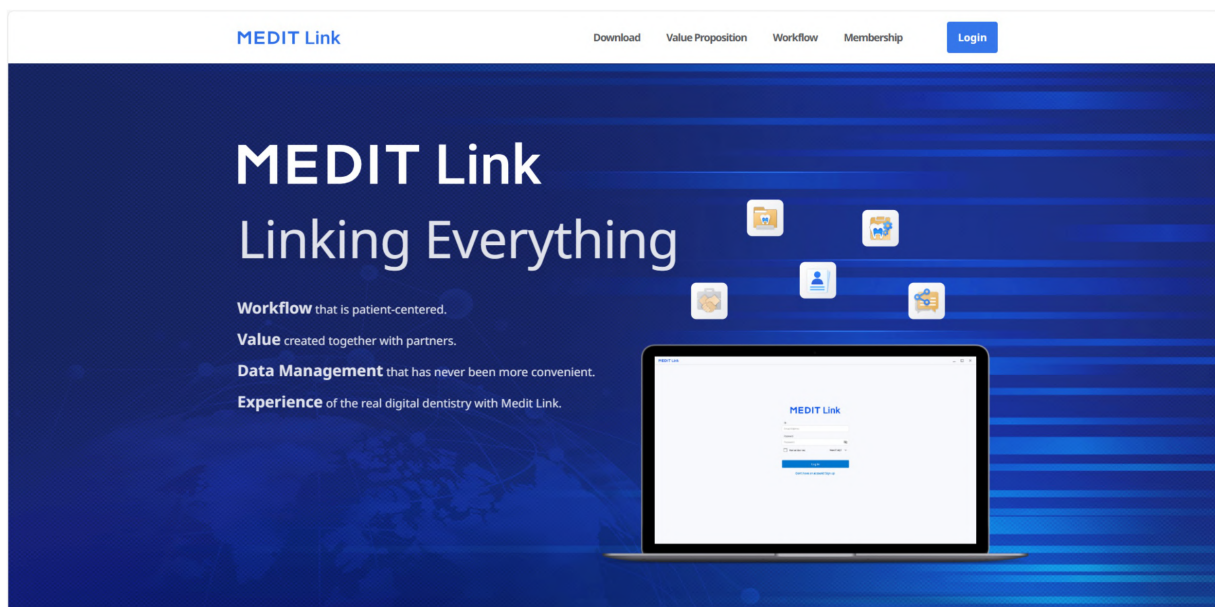

Opmerking

Meld u aan voor Medit Link China op www.meditlink.cn.

Aanmelden

Om de service van Medit Link te gebruiken, moet u eerst een account aanmaken. U kunt de functies van Medit Link gebruiken nadat u als praktijk of laboratorium een account heeft aangemaakt.

Gebruikers kunnen een van de volgende vier accounttypen selecteren om zich te registreren voor een lidmaatschap en gebruik te maken van de dienst met volledige of beperkte functionaliteit en privileges, afhankelijk van het gekozen accounttype.

- Praktijk - Beheerder
- Praktijk - Lid
- Lab - Beheerder
- Lab - Lid

De beheerder is meestal een vertegenwoordiger van uw organisatie en heeft volledige toegang tot alle functies en diensten van Medit Link. Het ledenaccount heeft daarentegen beperkte toegang.

Volg deze stappen om u aan te melden voor het lidmaatschap:

1. Klik op "Heeft u nog geen account? Meld u aan." op de inlogpagina.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)


 English (United States) ▼

- Klik na het lezen van de beschrijvingen op de knop "Registreren" voor het gewenste accounttype.

Create Your Medit Link Account



Clinic

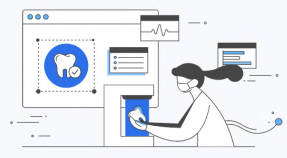

Lab

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

- Het volgende registratieformulier verschijnt.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

ⓘ Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

ⓘ Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

ⓘ Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

ⓘ Please type in the same password as above.

Select Country/Region

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

ⓘ Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

View

View

View

Back

Register

4. Voer de naam van de praktijk of het laboratorium in en doe vervolgens, afhankelijk van het gewenste accounttype, het volgende:
 - Als u zich registreert als beheerder, klikt u op "Controleer beschikbaarheid" om te zien of de ingevoerde naam beschikbaar is.
 - Als u zich als lid registreert, klikt u op "Zoeken". De beheerder moet uw organisatie al hebben geregistreerd voordat u zich aanmeldt.
5. Vul de rest van het registratieformulier in en klik op "Registreren".

Opmerking

Indien u tijdens het registratieproces akkoord gaat met het ontvangen van marketinginformatie, zult u nuttige informatie ontvangen over de producten en diensten van Medit.

6. Er wordt u een verificatiemail toegestuurd.
7. Om het registratieproces te voltooien, moet u uw e-mailadres verifiëren door op de ontvangen link te klikken.

Login en welkomspagina

1. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in op de inlogpagina en klik op "Inloggen".

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 


☐ Keep me logged in. [Need help? -](#)

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

2. Het volgende dialoogvenster verschijnt als u uw bedrijfsgegevens niet heeft ingevuld.

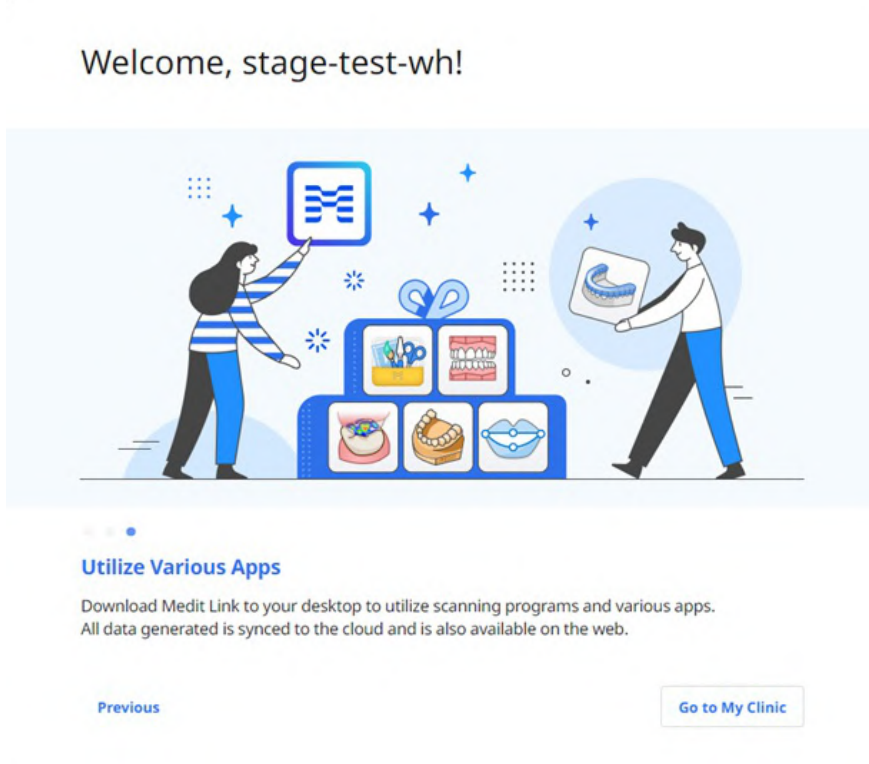

Opmerking


Om gebruik te maken van de diensten van Medit Link, dienen de gegevens van uw praktijk of laboratorium te worden ingevoerd via het beheerdersaccount.

3. Klik op de knop "Ga naar mijn praktijk" of "Ga naar mijn lab" en vul de gegevens van uw praktijk of laboratorium in, waaronder de bedrijfsnaam, cover/logo, aangeboden diensten, kantooradres, kantoornummer, etc.
4. U kunt de informatie die op de welkomstpagina is ingevoerd op elk gewenst moment bewerken via het tabblad My Info > Mijn Praktijk of Mijn Lab in Medit Link Web.

Dashboard

Dashboard overzicht

U kunt de statistieken van al het werk dat op Medit Link is gedaan bekijken in de vorm van grafieken en diagrammen, zowel in de Medit Link App als op het web.

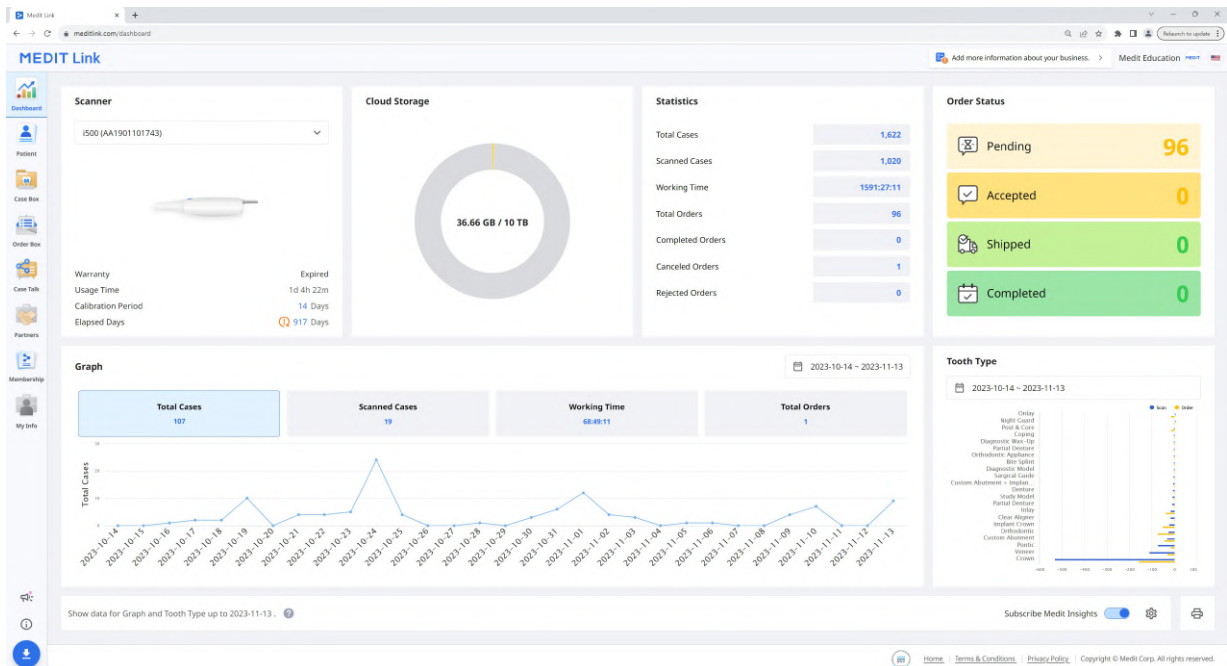

Grafieken en diagrammen in het dashboard tonen statistieken voor al het werk dat in Medit Link is gedaan.

Scanner	Biedt informatie over de actieve scanners, waaronder garantie, gebruikstijd van de scanner, het kalibratie-interval en de verstreken kalibratietijd.
Cloudopslag	Toont de totale capaciteit van de cloud en de hoeveelheid die in gebruik is.
Statistieken	Biedt statistieken over dossiers op basis van de status.
Orderstatus	Biedt statistieken over dossiers op basis van de orderstatus.
Grafiek	Grafiekinformatie per periode.
Tandtype	Geef statistieken over het aantal scans en orders per behandelingsinformatie.


Medit Insights

Medit Insights is een rapportageservice die u helpt bij het analyseren van uw gebruikstatistieken.

Opmerking

De volgende dienst is niet beschikbaar voor Medit Link China.

- [Medit Insights](#)

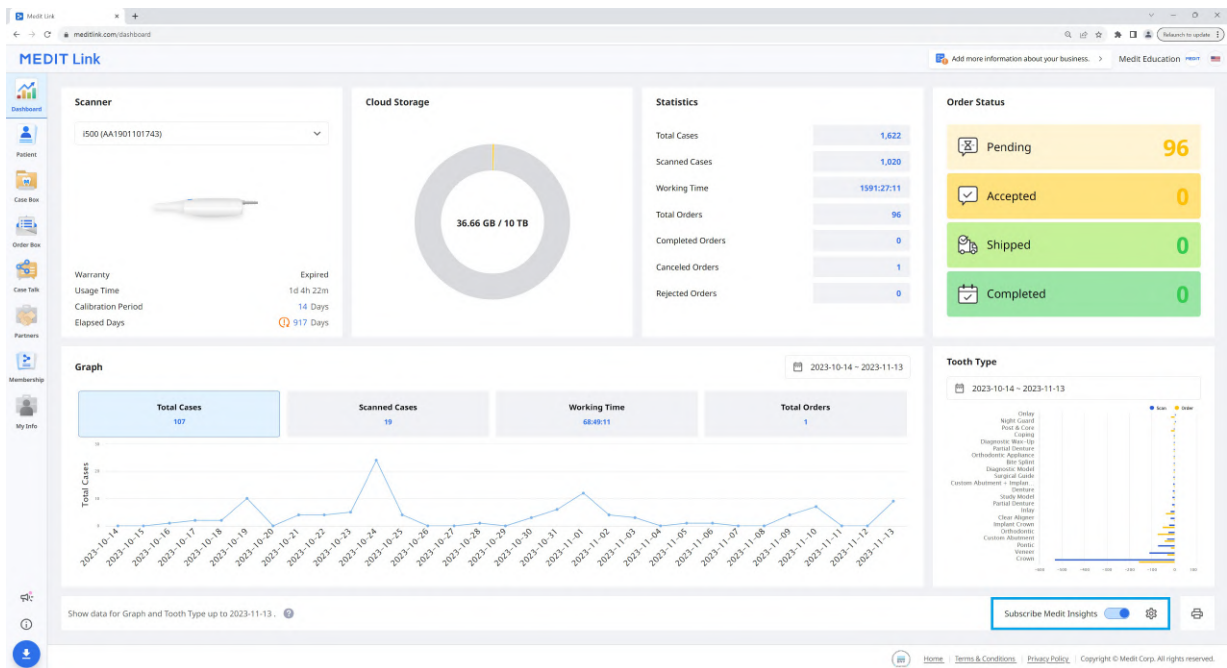

Abonneer op Medit Insights

U kunt op de tweede dag van elke maand een rapportageemail ontvangen. Er is geen extra aanmeldingsproces nodig. Schakel gewoon "Abonneren op Medit Insights" in.

Als u niet het e-mailadres gebruikt dat u voor uw Medit Link-account heeft gebruikt, kunt u een ander e-mailadres instellen om Medit Insights te ontvangen.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account
 ☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

Op de tweede dag van elke maand ontvangt u een e-mail met statistieken, zoals hieronder weergegeven.

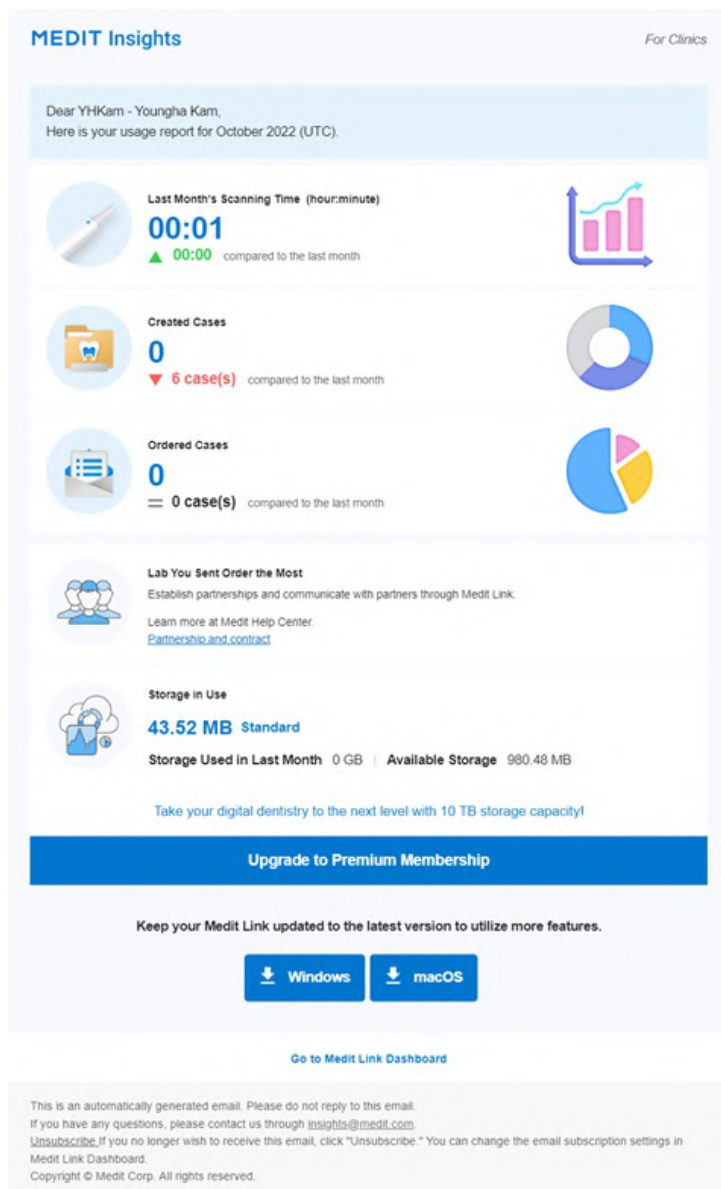

Banner	Medit biedt hier nuttige tips en informatie. * Als u de banner niet wilt zien, verwijdt u het vinkje bij Marketing- en promotieovereenkomst in Mijn Info > Mijn account.
Statistische informatie	De statistische informatie wordt weergegeven, zoals scantijd, aangemaakt dossiers, meest bestelde lab, etc.
Medit Link Download	De knop bevat de downloadlink van Medit Link.
Dashboard	Alle statistische informatie is gebaseerd op de informatie op uw Dashboard. Bekijk meer details op het Dashboard.


Uitschrijven voor Medit Insights

Schakel "Abonneren op Medit Insights" uit op het Dashboard of klik op "Uitschrijven" in de ontvangen e-mail.

Patient

U kunt dossiers beheren op basis van patiëntnaam en Patiënt-ID.


Alle patiënten die geregistreerd zijn via de Medit Link-app worden in een lijst weergegeven, waardoor het eenvoudiger wordt om patiënten en hun dossiers te beheren.

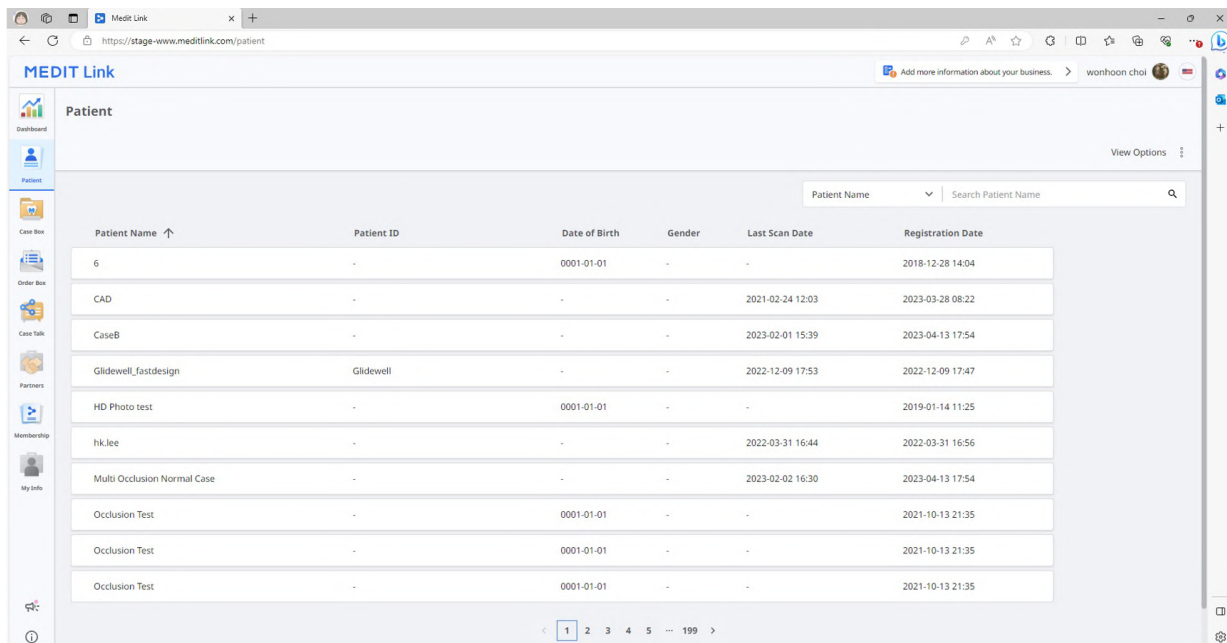

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
Glidewell_fastdesign	Glidewell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hiklee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

Patiënt zoeken


1. Kies uw zoekcriteria; Patiëntnaam of Patiënt-ID in het vervolgkeuzemenu rechtsboven in de patiëntenlijst.

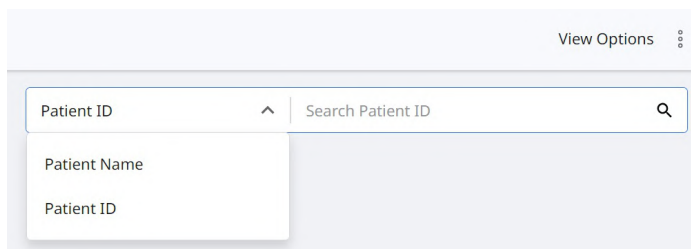

2. Voer de patiëntnaam of het patiënt-ID in om te zoeken aan de hand van de geselecteerde zoekcriteria.
3. Alleen patiënten met de ingevoerde patiëntnaam of patiënt-ID worden in de lijst weergegeven.

Case Box/Work Box

De Case Box (praktijk) of Work Box (lab) toont alle dossiers die de gebruiker op de Medit Link-applicatie heeft aangemaakt. Bekijk bestanden via een webbrowser zonder dat u een apart programma hoeft te installeren.

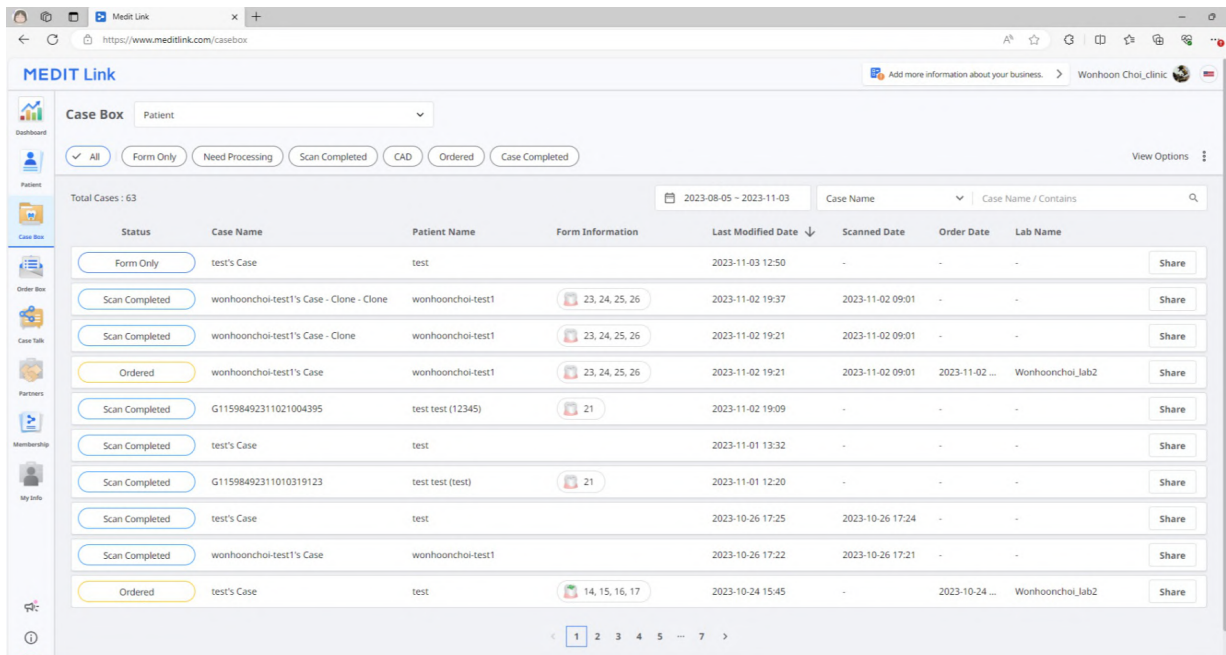


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo and a user profile. Below the header, there's a sidebar with navigation icons. The main area displays a list of cases. At the top of the list, there are filters: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. Below the filters, there's a table with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table contains several rows of case data. At the bottom of the table, there's a pagination bar showing '1' of 7 pages.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_lab2

Dossiers filteren


Op patiënt filteren

U kunt dossiers op patiënten filteren. Dit is nuttig wanneer u dossiers voor specifieke patiënten nodig heeft.

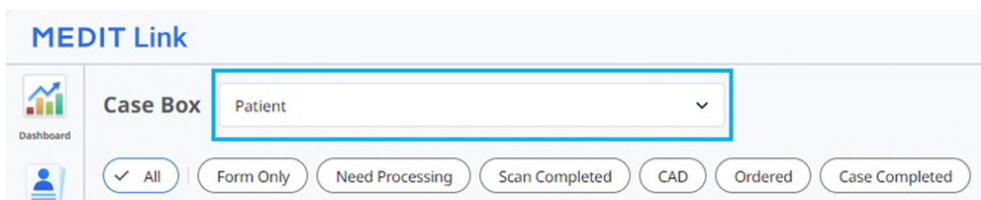

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' dropdown menu is open, showing a list of patient names. The first patient name is 'test'. Below the list, there's a 'View More' link.

1. Voer een patiëntnaam in het zoekveld in.

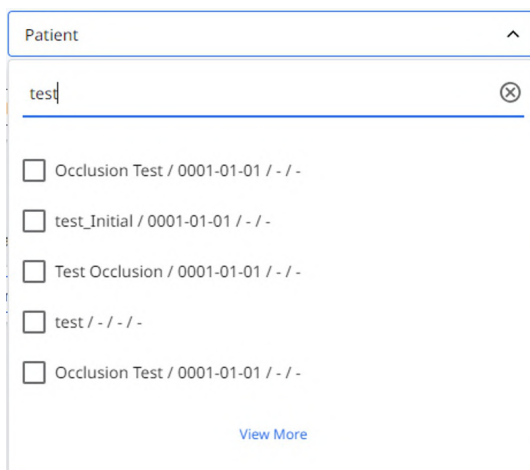

The screenshot shows the patient search dropdown menu. The search field contains the text 'test'. Below the search field, there's a list of patient names with checkboxes next to them. The first patient name is 'test'. Below the list, there's a 'View More' link.

2. Selecteer een patiënt uit de lijst met zoekresultaten.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
+ 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

View More

Selected Patients

Clear Selection

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

- Alleen dossiers van de geselecteerde patiënten worden in de lijst weergegeven, waardoor het eenvoudiger wordt om de dossiers te vinden waarmee u wilt werken.

MEDIT Link
Add more information about your business.
Wonhoon Choi_clinic

Case Box
Patient

All
Form Only
Need Processing
Scan Completed
CAD
Ordered
Case Completed

Total Cases : 63
2023-08-05 - 2023-11-03
Case Name
Case Name / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share

1 2 3 4 5 ... 7

Filter op status

U kunt dossiers filteren op basis van hun status.

All
☒ Form Only
Need Processing
☒ Scan Completed
CAD
Ordered
Case Completed

- De gebruiker kan op de gewenste status klikken. De browser toont alleen dossiers met de gekozen status.
- De gebruiker kan meerdere statussen tegelijk selecteren.

De volgende statutstypen zijn beschikbaar op basis van het type account:

Case Box (Clinic)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Lab)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done


Filter op duur

U kunt dossiers filteren en weergeven die voor het laatst werden gewijzigd binnen de door u ingestelde periode.

1. Klik op de periodefilter.



2. Selecteer het tijdbereik.

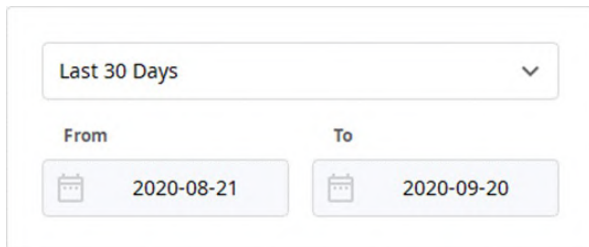


- Alle: Toont alle dossiers.
- Aangepast bereik: Geef begin- en einddatum op om dossiers weer te geven die binnen die periode zijn gewijzigd.
- Vandaag: Toont dossiers die vandaag voor het laatst zijn gewijzigd.
- Gisteren: Toont dossiers die gisteren voor het laatst zijn gewijzigd.
- Afgelopen 7 dagen: Toont dossiers die in de afgelopen 7 dagen voor het laatst zijn gewijzigd, behalve vandaag.
- Afgelopen 30 dagen: Toont dossiers die in de afgelopen 30 dagen voor het laatst zijn gewijzigd, behalve vandaag.
- Afgelopen 90 dagen: Toont dossiers die in de afgelopen 90 dagen voor het laatst zijn gewijzigd, behalve vandaag.
- Deze maand: Toont de dossiers van deze maand.
- Vorige maand: Toont de dossiers van de vorige maand.

De dossierlijst wordt in realtime bijgewerkt met de dossiers die binnen de geselecteerde periode zijn aangemaakt of voor het laatst zijn gewijzigd.

Filter op zoekopdracht


U kunt de zoekmogelijkheden gebruiken om eenvoudig en snel de gewenste informatie op te zoeken.

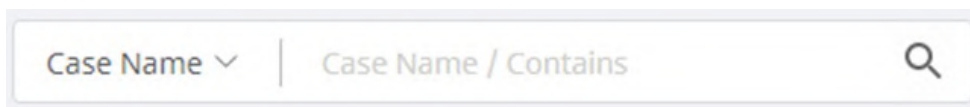

De volgende zoekopties zijn beschikbaar op basis van het type account:

Case Box (Clinic)	Dossiernaam, patiëntnaam, patiënt-ID, laboratoriumnaam
Work Box (Lab)	Dossiernaam, patiëntnaam, praktijknaam, Order-ID

Dossierdetails

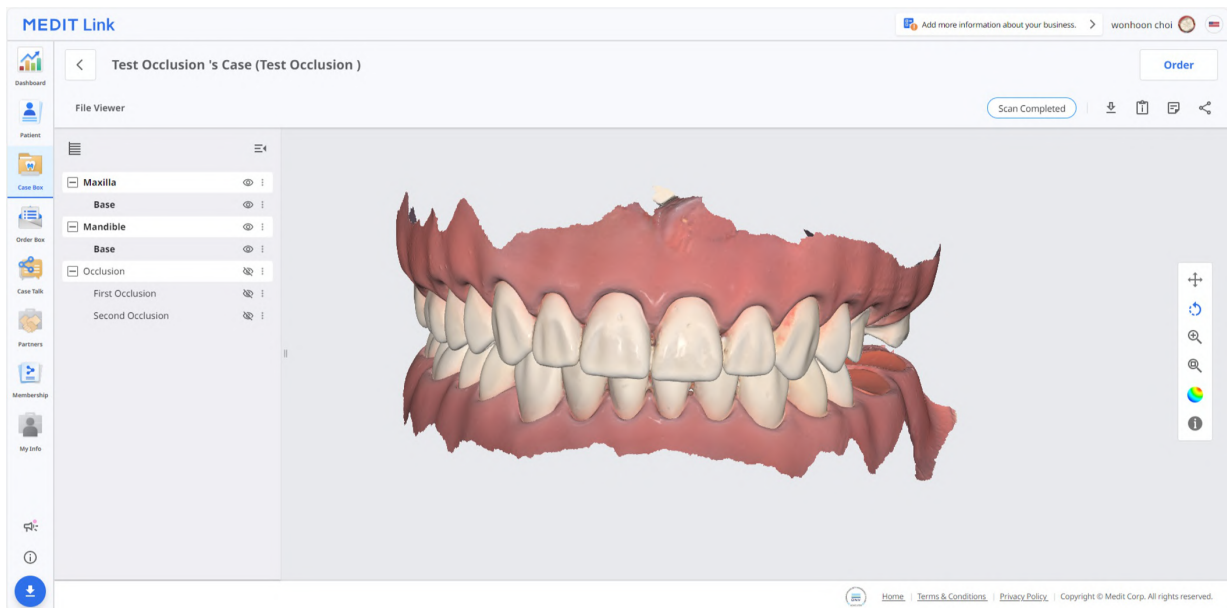

In de Case Box/Work Box vindt u de volgende instrumenten voor dossierbeheer.

	Dossierstatus	Toont de status van het dossier.
	Ga naar Order Box/In Box	Biedt een sneltoets voor hetzelfde dossier in een andere box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Downloaden	Download bestanden in het dossier naar de lokale pc.
	Dossierinformatie	Bekijk de details van het dossier en sla ze op als PDF-bestand of print ze uit.
	Notitie en tags	Voeg notities of tags toe bij het registreren of bestellen van een dossier. Gebruik ze om aanvullende informatie over het dossier aan uw partners mee te delen.
	Delen	Maak een link om te delen. Gebruikers met de link hebben toegang tot de 3D-gegevens in een browser zoals Chrome, Firefox of Safari, zonder dat er extra programma's geïnstalleerd hoeven te worden.

Order Box/In Box

De Order Box (clinic) of In Box (lab) toont bestelde dossiers op de MEDIT Link-applicatie.

Orderdetails

- | | |
|---|---|
| 1 | Toon de dossiernamen en de patiëntnamen. |
| 2 | Biedt functies voor orderbeheer (accepteren/annuleren; bezorgen/ontvangen). |
| 3 | Toon beschikbare tabbladen: Order, Bestandenbepijker |
| 4 | Toont functies voor het beheer van dossiers en bestanden: dossierstatus, sneltoetsen voor gedetailleerde informatie, dossierinformatie, notitie en tags, etc. |
| 5 | Toon de gedetailleerde informatie voor de order, waaronder het ordernummer, de patiëntnaam, de partnernaam, de scandatum, de orderdatum, de bezorgdatum, en de notitie en tags. |
| 6 | Toon de bestelde productinformatie en de bezorgstatus. |


Tabbladen in Order Box/In Box

Bestelling	Bestandenbepijker
Controleer de gedetailleerde informatie over de order, zoals Order-ID, patiëntnaam, accountnaam, scandatum, orderdatum, bezorgdatum, notitie en tags.	Bekijk bestanden die zijn gegenereerd door scan/CAD-werkzaamheden. De bestandenweergever toont en beheert de verworven of bijgevoegde 3D-modellen en 2D-afbeeldingen.

Case Talk

De dossiers die in Medit Link zijn aangemaakt, kunnen worden gedeeld met specifieke mensen. Iedereen met de gedeelde link of geregistreerde leden van Medit Link.

De gebruiker kan via "Case Talk" in zowel de Medit Link App als Medit Link Web een lijst zien van alle gedeelde dossiers.

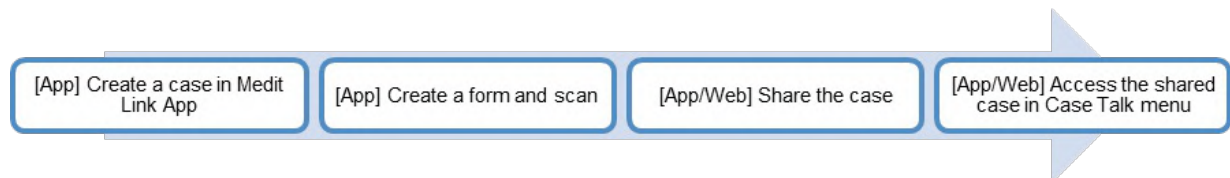


Gedeelde dossiers kunnen worden bekeken via een webbrowser zonder dat er een apart programma geïnstalleerd hoeft te worden. Dit maakt eenvoudige communicatie over 3D-gegevens op verschillende apparaten mogelijk.


Een Case Talk aanmaken

U kunt een gedeelde link maken naar een dossier die is aangemaakt in Case Box/Work Box.

1. Zoek een dossier dat u wilt delen en klik op de knop "Delen" aan de rechterkant.

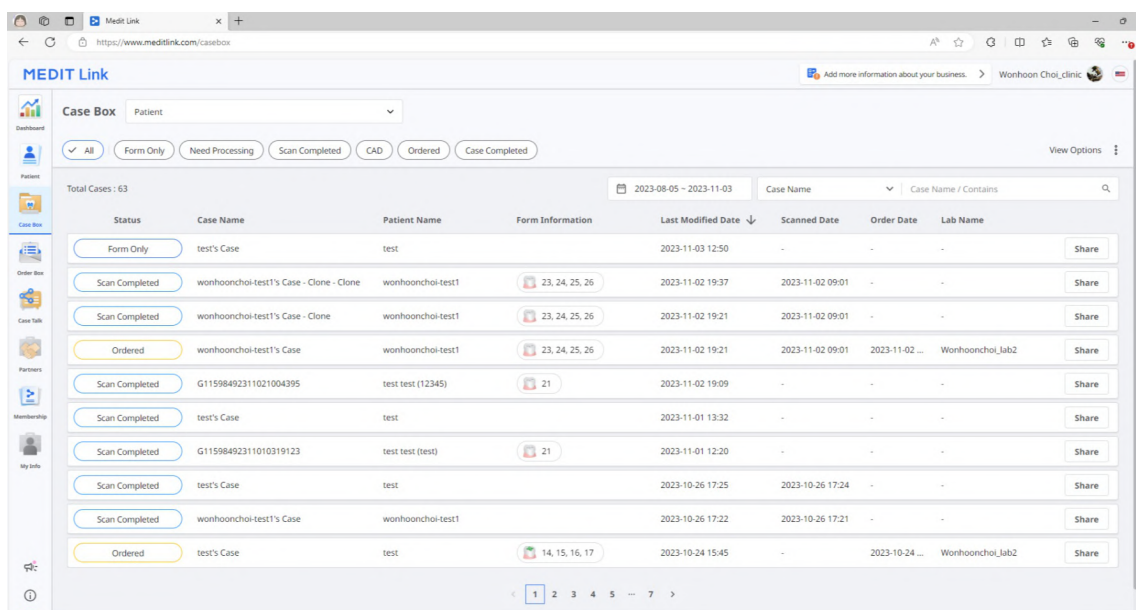

2. Selecteer de bestanden die u wilt delen.

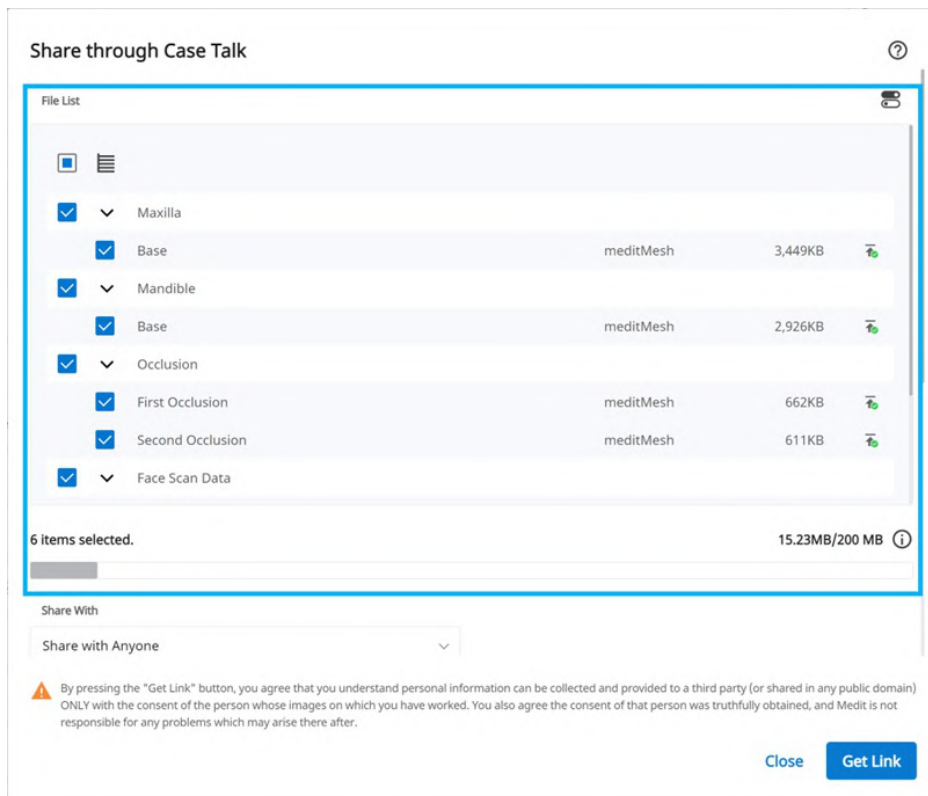

3. Stel het type toestemming voor delen en de opties voor delen in.
4. Klik op "Link aanmaken" om een gedeelde link te maken.

Het type toestemming voor delen en de opties voor delen instellen

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Share via

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024


By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close
Get Link

Deel met	- Deel met iedereen Maakt een gedeelde link. U kunt de bestanden met iedereen delen. - Deel met specifieke personen Maakt een gedeelde link en stuurt deze naar specifieke personen.
Deel via	Als u "Deel met specifieke personen" selecteert, kunt u de link op verschillende manieren met specifieke mensen delen. - E-mailadres - SMS - Partners
Vervaldatum	Stel de vervaldatum van de link in. Nadat de link is verlopen, hebben de mensen met wie u de link heeft gedeeld geen toegang meer tot de bestanden. U kunt de vervallperiode tot 90 dagen na vandaag verlengen.
Pincode	Stel een 6-cijferige toegangscode in om de gegevens te beveiligen.
Patiëntnaam delen	Als u deze optie aanvinkt, kunnen alle mensen met de link de naam van de patiënt zien.
Verleen toestemming om te downloaden	Als u deze optie aanvinkt, kunnen alle gebruikers met de link de bestanden downloaden.
Opmerkingen toestaan	- Als u deze optie aanvinkt, kunt u communiceren via de gedeelde link. - Als u de optie uitschakelt, kan de ontvanger uw opmerkingen bekijken, maar geen eigen opmerkingen toevoegen.
Opmerking	U kunt een bericht achterlaten in de opmerkingen.

Case Talk details

U kunt bestanden in het gedeelde dossier zien. De volgende functies zijn beschikbaar op de detailpagina van Case Talk.

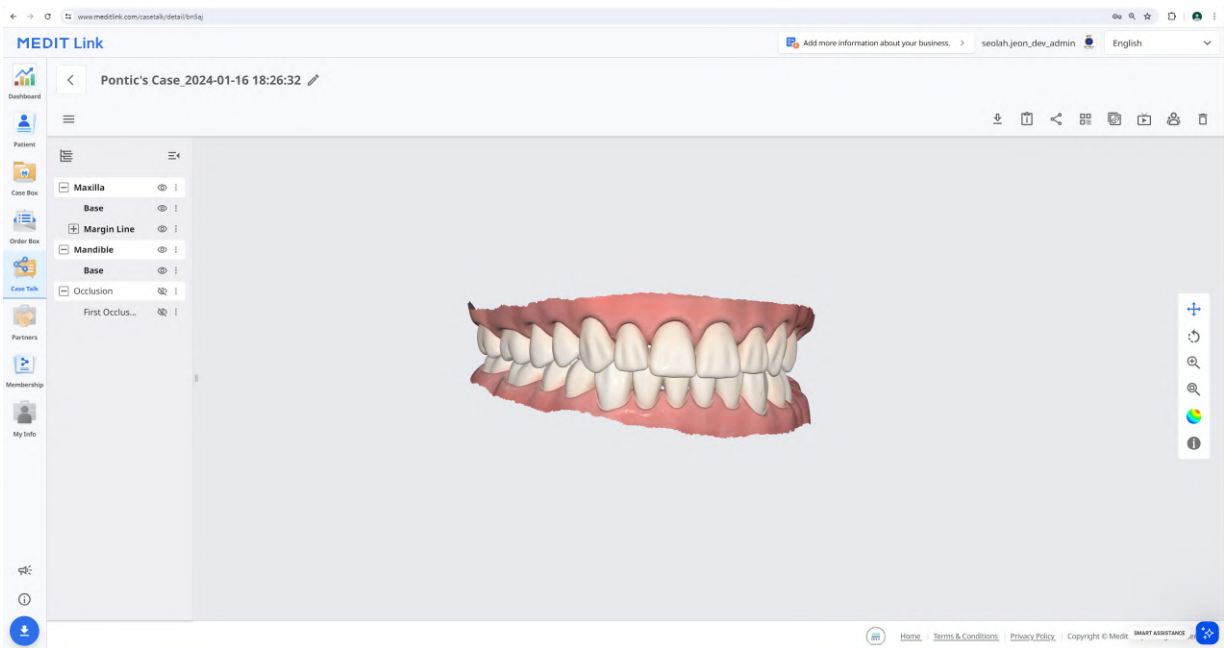

	Downloaden	Download alle bestanden in het dossier naar de lokale pc.
	Dossierinformatie	Toont gedetailleerde informatie over het dossier.
	Delen	Wijzig de deelininstellingen.
	QR-code	Deel het dossier met een QR-code.
	Kopieer link	Kopieer de gedeelde link naar het klembord. De gekopieerde link toont de gedeelde bestanden in uw webbrowser.
	Live	Deel uw scherm met de verbonden gebruikers. Scherm delen wordt gesynchroniseerd met de verbonden gebruikers.
	Deelnemers	Toont alle gebruikers die toegang hebben tot de gedeelde link.
	Wissen	Verwijder de gedeelde link. Een verwijderde gedeelde link is niet langer toegankelijk.

Opmerking


De volgende diensten zijn niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Live
- Deelnemers

Web Viewer

U kunt gedeelde gegevens bekijken via Case Talk in een webbrowser.

Het is mogelijk om te communiceren met mensen die toegang hebben tot de link door annotaties en opmerkingen te plaatsen.

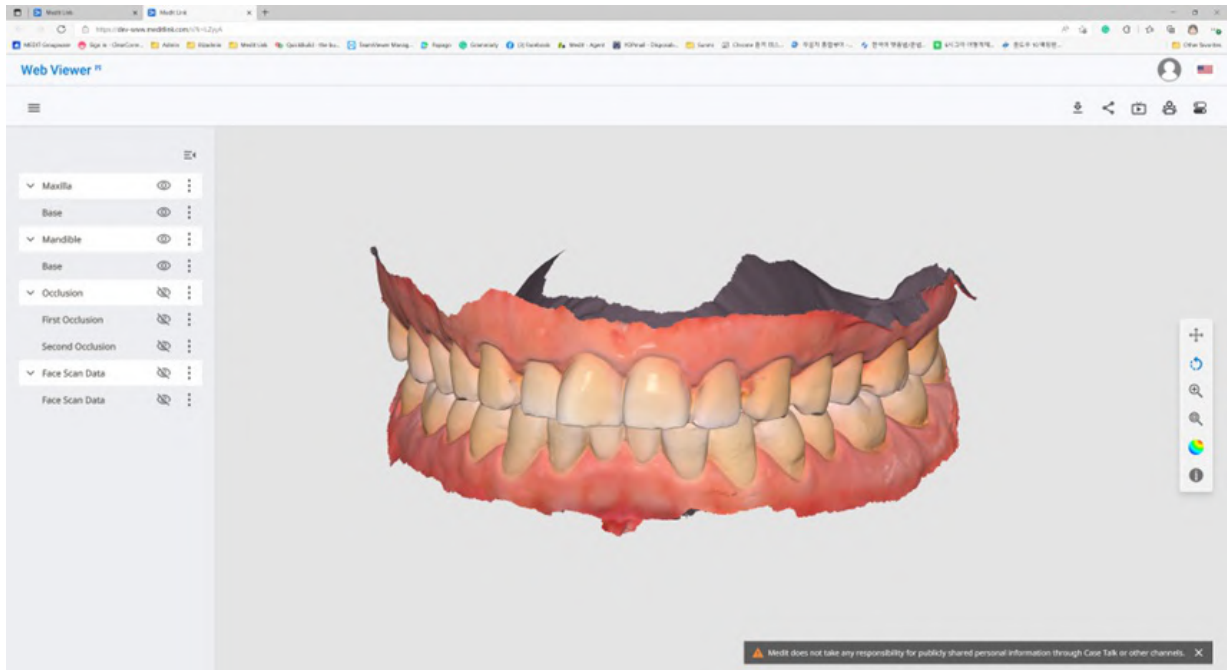

	Downloaden	Download alle bestanden in dit dossier naar de pc.
	Dossierinformatie	Toont gedetailleerde informatie over het dossier.
	Delen	Wijzig de deelininstellingen.
	QR-code	Kopieer de gedeelde link naar het klembord. De gekopieerde link toont de gedeelde bestanden in uw webbrowser.
	Live	Deel uw scherm met de verbonden gebruikers. Scherm delen wordt gesynchroniseerd met de verbonden gebruikers.
	Deelnemers	Toont alle gebruikers die verbonden zijn met de gedeelde link.
	Tandnummering	Wijzig het systeem voor tandnummering.


Opmerking

De volgende diensten zijn niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Live
- Deelnemers

Annotatie

Voeg annotaties toe aan een specifieke locatie op het 3D-model. Iedereen met de link kan de door u toegevoegde annotaties bekijken.

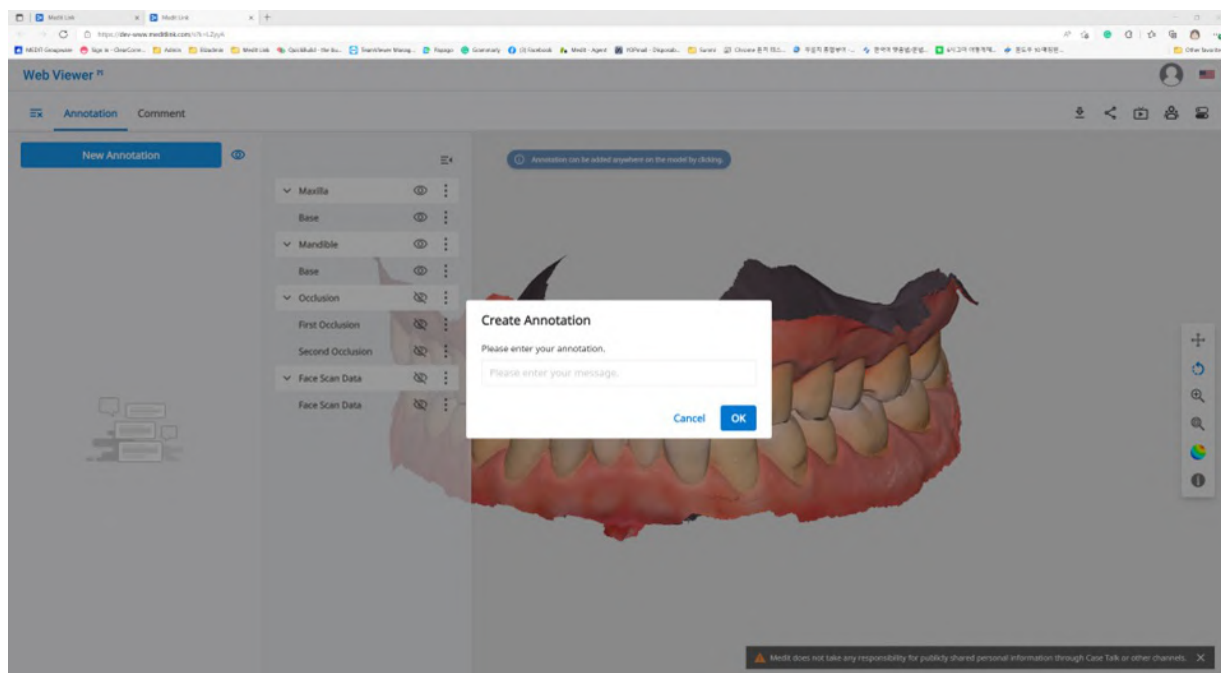

Opmerking

De volgende dienst is niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Annotatie

1. Zoek het menu in de linkerbovenhoek en selecteer het tabblad "Annotatie". Gebruik de knop "Nieuwe annotatie" om met één klik overal op de gegevens een annotatie toe te voegen.
2. Typ het bericht en klik op "OK" om het op te slaan.

3. U kunt annotaties gebruiken als een eenvoudig communicatiemiddel. Klik op de aangemaakte annotatie om een antwoord in te voeren en druk op "Verzenden".

Opmerkingen

U kunt communiceren met gebruikers die toegang hebben tot de link via het tabblad "Opmerking" in het Web Viewer-menu.

Opmerking

De volgende dienst is niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Opmerking

Realtime scherm delen

U kunt uw scherm in realtime delen.

Opmerking

De volgende dienst is niet beschikbaar voor Medit Link China.

- Live

1. Klik op "Live" om uw Web Viewer-scherm met de verbonden gebruikers te delen.





2. Klik op "OK" om uw scherm te delen.
3. Andere mensen die toegang hebben tot de link moeten het delen van het scherm accepteren.
4. Het scherm van de persoon die het scherm deelt, wordt synchroon weergegeven op het scherm van de persoon die het verzoek heeft ontvangen.



Gegevensboom

Alle gegevens worden ingedeeld en weergegeven op basis van kenmerken in de gegevensboom. U kunt gegevens tonen of verbergen, de ondoorzichtigheid aanpassen, etc.

Gegevensboom beheren

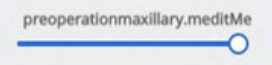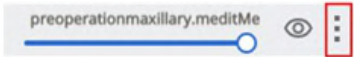Toon/Verberg	Klik op het "oog"-pictogram om gegevens te tonen of te verbergen. Beheer de zichtbaarheid van gegevens als groep of individueel bestand.
Ondoorzichtigheid	Beweeg de muis over een zichtbaar element om de schuifbalk voor ondoorzichtigheid weer te geven. Beweeg de schuifbalk heen en weer om de transparantie van uw gegevens te wijzigen. 
Uitgebreid menu	Het uitgebreide menu bevindt zich aan de rechterkant van elk element op de gegevensboom. Het bevat de volgende opties:  • Alleen deze weergeven: Verberg alle andere gegevens behalve de huidige gegevens. • Verbergen: Verberg de huidige gegevens.

3D-model beheren

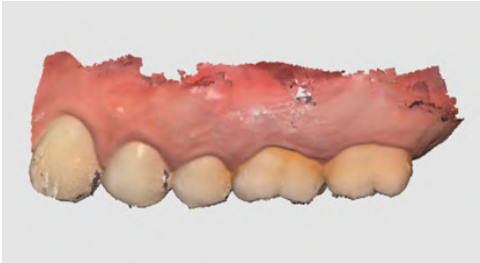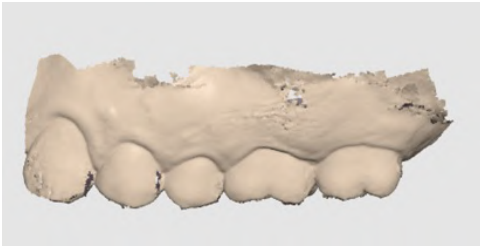	Verplaatsen	Verplaats het model.
	Roteren	Roteer het model.
	In-/uitzoomen	Zoom in en uit op het model.
	Zoom aanpassen	Plaats model in het midden van het scherm.
	Modelweergave modus	Toon gegevens in echte structuurkleuren. 
		Toon gegevens in een enkele kleur. 

Partners

U kunt zoeken naar potentiële partners om een samenwerking mee aan te gaan en de lijst met huidige partners bekijken.


Opmerking

Diensten die gebruik maken van Google Maps zijn niet beschikbaar voor Medit Link China.

Zoek naar partners


U kunt Medit Link-gebruikers zoeken op basis van hun bedrijfsnaam en/of adres.

In de zoekresultaten kunt u een samenwerkingsverzoek sturen naar een bedrijf waarmee u zou willen samenwerken.

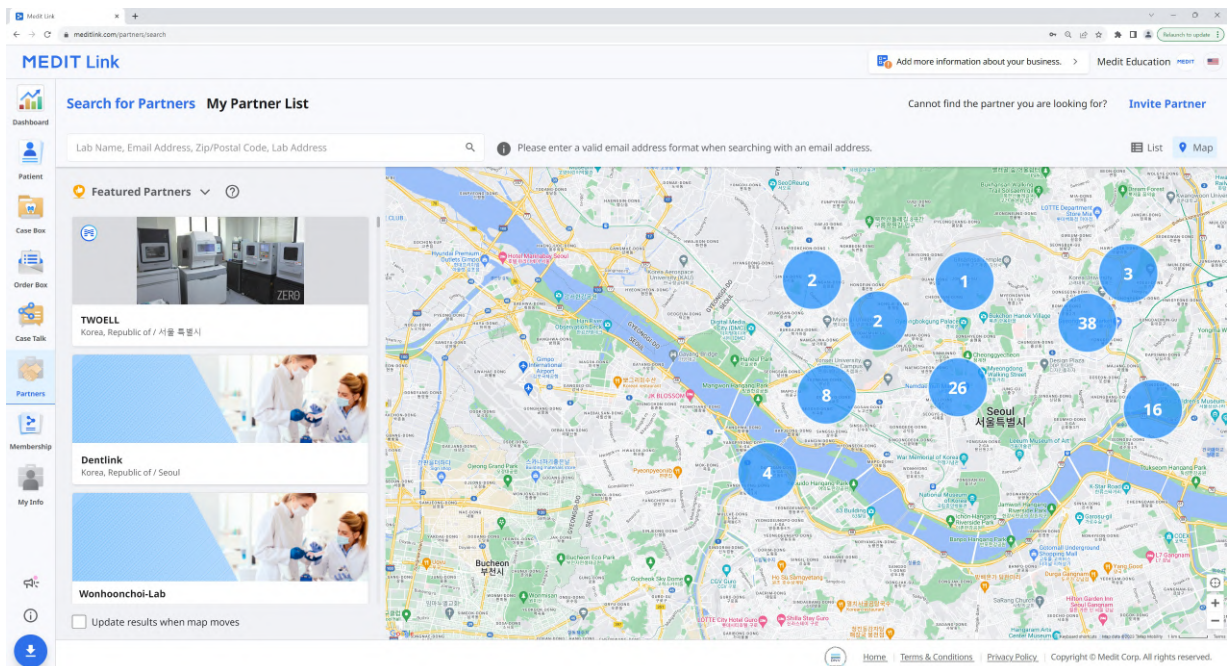

Mijn partnerlijst

U kunt uw huidige samenwerkingsverbanden met al uw bestaande partnerbedrijven bekijken in het gedeelte "Mijn partnerlijst".

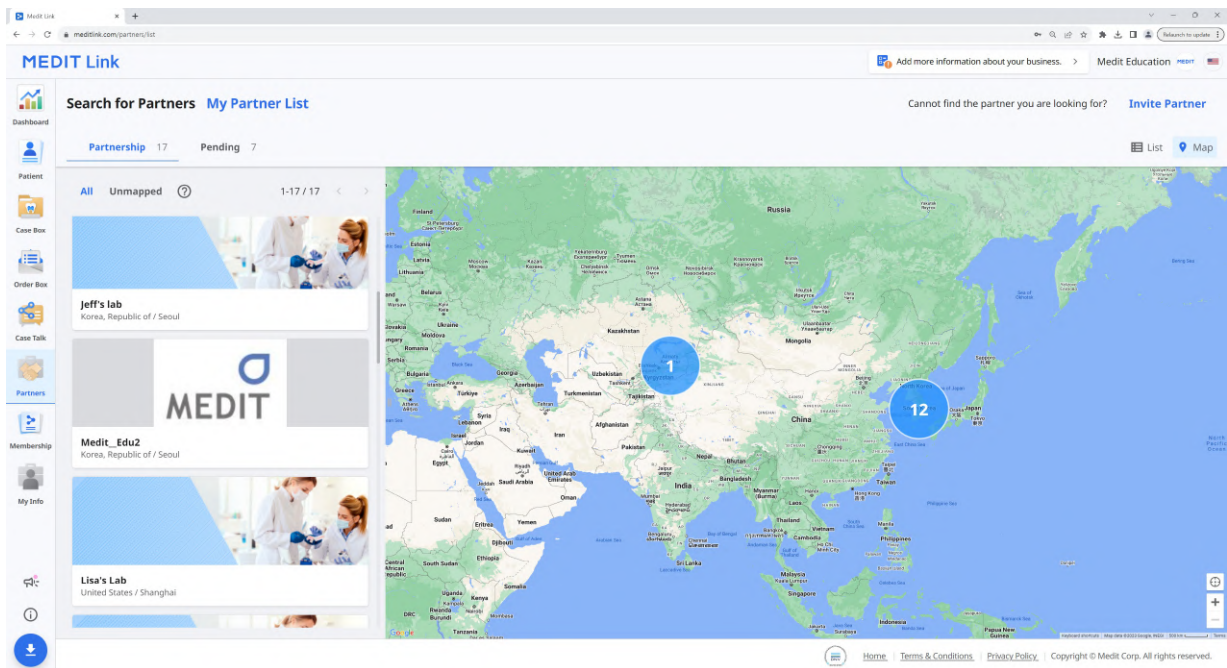

Partner uitnodigen

Als u met een praktijk of laboratorium wilt samenwerken, kunt u deze uitnodigen om lid te worden van Medit Link. Het samenwerkingsverband wordt automatisch gevormd zodra de uitnodiging wordt geaccepteerd.

1. Klik op "Partner uitnodigen" linksboven in uw scherm.
2. Voer het e-mailadres in van het bedrijf waarmee u wilt samenwerken en stuur een uitnodiging met een verzoek tot samenwerking.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. Zodra de uitgenodigde organisatie de uitnodiging accepteert en zich aanmeldt voor Medit Link, wordt het samenwerkingsverband automatisch tot stand gebracht.

Membership

Lidmaatschap

The screenshot shows the Medit Link Membership page. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main content area is titled 'Plan' and shows the 'Premium' plan selected. The plan details include a price of \$0.99 per user per month and a list of benefits: A paid plan, 10 TB of cloud storage, Efficient for users with many cases and various data, and One-month free trial included. Below the plan details, there are four premium benefits: Sample Coupon 1 (Medit Partner, expires 2023-02-25), Sample Coupon 2 (Medit Partner, expires 2023-02-25), 5% Off (Dental Company, expires 2024-04-27), and Sample Boucher (Standard, expires 2024-04-30). A 'Subscribe' button is visible. On the right, the 'Cloud Storage' section shows a donut chart indicating 4.75 GB / 10 TB usage. Below the chart, there are options to select data for deletion: 'Total Selected' (0.00 KB), 'Raw Data' (30.51 GB), and 'Result Files & Attachments' (4.72 GB).

Plan

U kunt zien wat elk plan biedt, inclusief kortingsbonnen en vouchers, evenals uw huidige abonnementsstatus. U kunt uw abonnement op elk moment upgraden of opzeggen.

The screenshot shows the Medit Link Membership page with the 'Standard' plan selected. The plan details include a price of \$0.99 per user per month and a list of benefits: A paid plan, 10 TB of cloud storage, Efficient for users with many cases and various data, and One-month free trial included. Below the plan details, there are four premium benefits: Sample Coupon 1 (Medit Partner, expires 2023-02-25), Sample Coupon 2 (Medit Partner, expires 2023-02-25), 5% Off (Dental Company, expires 2024-04-27), and Sample Boucher (Standard, expires 2024-04-30). A 'Subscribe' button is visible. The right sidebar is not visible in this screenshot.

Medit Link biedt de volgende lidmaatschapsplannen:

Standard

- Gratis standaardplan voor alle aangemelde gebruikers
- 1 GB cloudopslag
- Voor nieuwe gebruikers

Premium

- Betaald plan
- 10 TB cloudopslag
- Voor gebruikers met veel dossiers en verschillende soorten gegevens
- Een maand gratis uitproberen

	Standard	Premium
Cloudopslag	1 GB	10 TB
Maandelijks kosten	Gratis	\$0,99/maand


* Cloudopslag berekent de ruimte die ruwe gegevens innemen niet.

Opmerking

De lidmaatschapsplannen zijn beschikbaar voor Medit Link China. U kunt het Premium-plan gratis gebruiken tot aan de officiële release van de functie.

Cloudopslag

In het rechtergedeelte kunt u uw cloudopslag beheren.

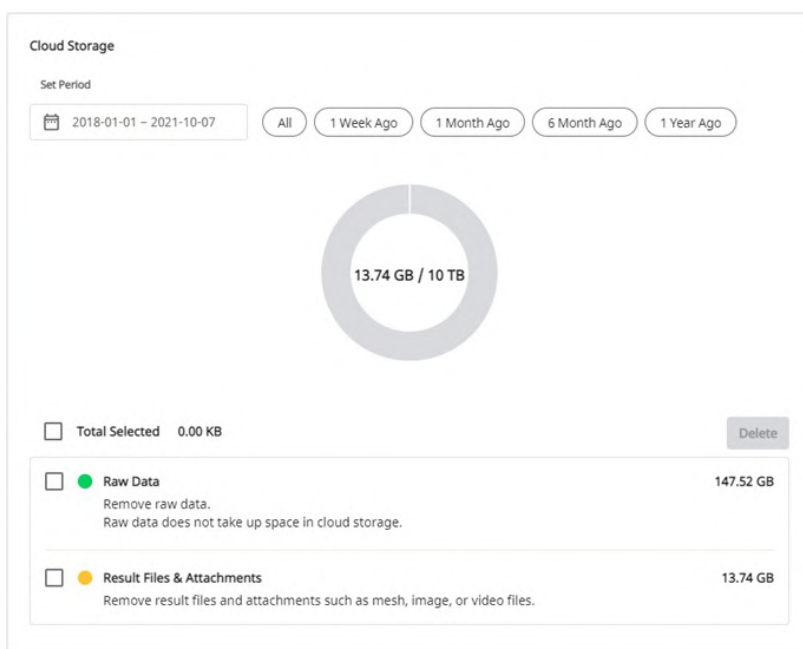


Periode instellen	Stel de specifieke periode in om gegevens te verwijderen die binnen dat tijdsbestek zijn aangemaakt. • Alle: Bekijk alle bestanden. • 1 week geleden: Bekijk de bestanden die een week geleden zijn aangemaakt. • 1 maand geleden: Bekijk de bestanden die een maand geleden zijn aangemaakt. • 6 maanden geleden: Bekijk de bestanden die zes maanden geleden zijn aangemaakt. • 1 jaar geleden: Bekijk de bestanden die een jaar geleden zijn aangemaakt.
Ruwe gegevens	De ruwe gegevens nemen geen opslagruimte in beslag, dus zijn ze niet in het cirkeldiagram te zien. Indien nodig kunt de ruwe gegevens van hieruit beheren, bijvoorbeeld door ze te verwijderen om de privacy van de patiënt te beschermen.
Resultaat en bijlage	De resultaten en bijlagen nemen ruimte in beslag in de cloud. Als de cloud vol is, kunt u meer opslagruimte vrijmaken door onnodige bestanden te verwijderen.
Wissen	Verwijder geselecteerde bestanden uit de cloudopslag om ruimte vrij te maken.

Abonneren


Als u momenteel het Standard plan of het Premium plan met een inwisselcode gebruikt, kunt u zich abonneren op het Premium-plan.

De betaling wordt voltooid via Stripe (www.stripe.com).

1. Ga naar Lidmaatschap > Plan > Premium en klik op de knop "Abonneren".

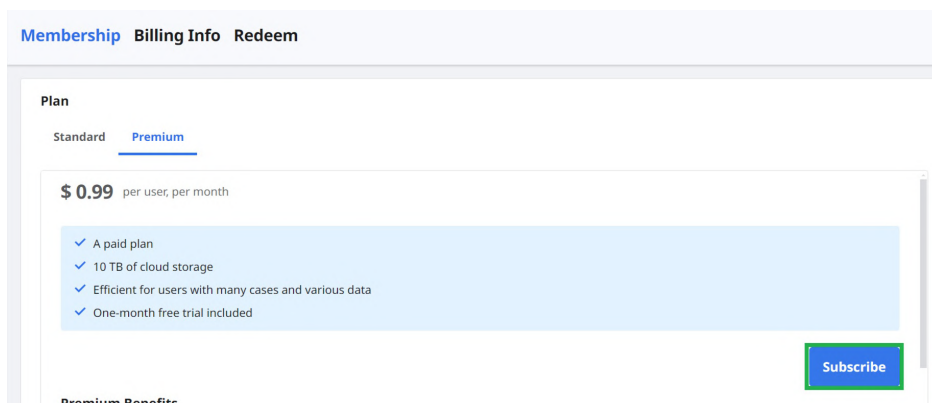

2. Controleer de beschrijving van het Premium plan en klik opnieuw op "Abonneren".

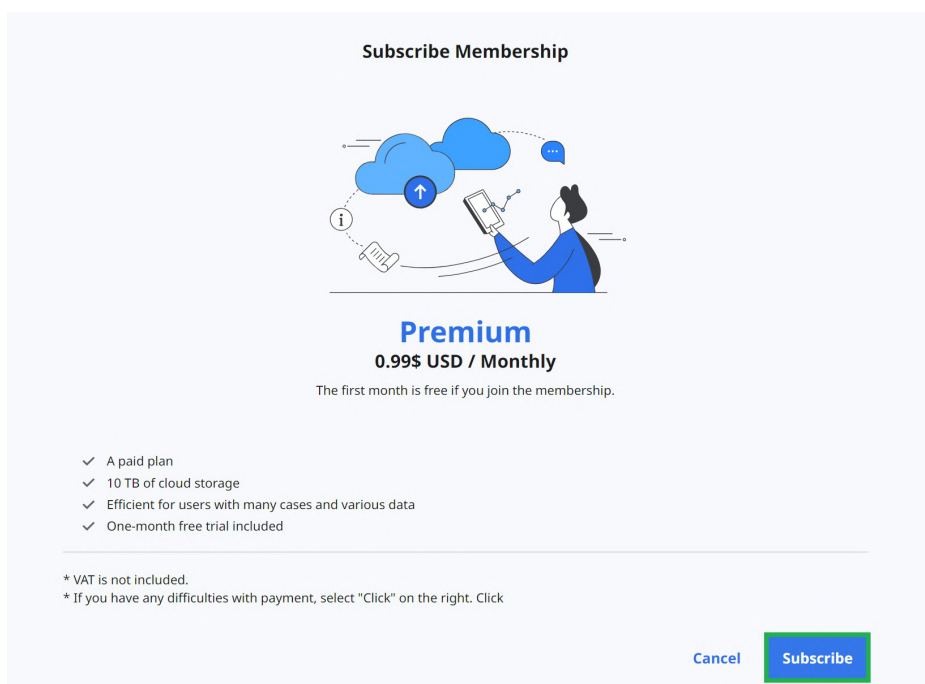

3. Controleer de prijs en voorwaarden en voer de informatie in die nodig is voor de betaling. Klik vervolgens op "Abonneren".

←

MEDIT Link

TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day after coupon expires

Premium membership for Clinic

\$0.99

Medit Link Membership

Billed daily

Subtotal

\$0.99

1 MONTH FREE – for first subscription

-\$0.99

100% off for a day

Total due today

\$0.00

Powered by stripe

Terms

Privacy

Pay with link ➡

Or pay with card

Email

yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea


Securely save my information for 1-click checkout

Pay faster on MEDIT SG PTE. LTD. and everywhere Link is accepted.

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.


- De betaling kan enkele seconden in beslag nemen. Zodra de betaling is voltooid, ziet u een bevestigingsbericht.

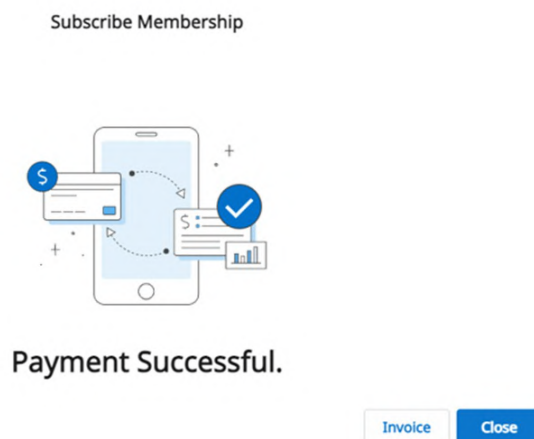

Opzeggen

U kunt het lidmaatschap op elk moment opzeggen. Na het opzeggen kunt u het Premium lidmaatschap nog steeds gebruiken voor de resterende dagen van die betaalde maand. Uw plan wordt vanaf de volgende betaaldag gewijzigd naar Standaard, en de cloudopslag wordt beperkt tot 1 GB. Als de capaciteit van de cloudopslag wordt overschreden, wordt er geen back-up gemaakt van de bestanden en zijn de functies voor bestellen en delen niet beschikbaar.

- Klik op "Opzeggen".
- Klik op "Abonnement opzeggen".

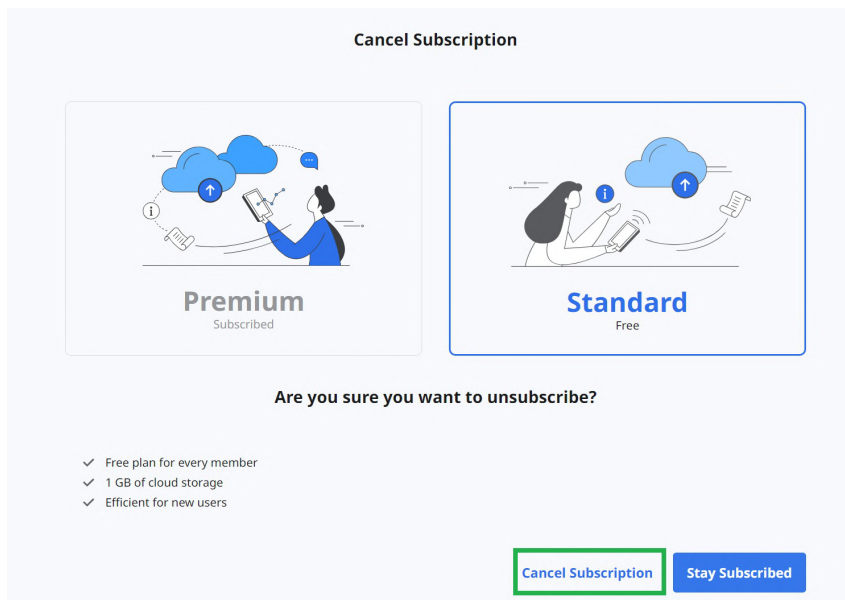

3. Om te bevestigen dat u het abonnement wilt opzeggen, klikt u in het nieuwe pop-upvenster nogmaals op "Abonnement opzeggen".


Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription

Stay Subscribed

4. Uw abonnement is opgezegd.
5. Uw plan wordt vanaf de volgende betaaldag gewijzigd naar Standaard, en de cloudopslag wordt beperkt tot 1 GB. Als de capaciteit van de cloudopslag wordt overschreden, wordt er geen back-up gemaakt van de bestanden en zijn de functies voor bestellen en delen niet beschikbaar.

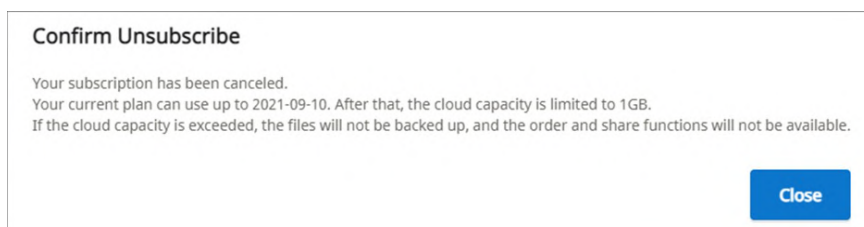

Betalingsinformatie

U kunt de betalingsgeschiedenis voor abonnementen bekijken, inclusief een factuur voor elke betaling. U kunt ook de betaalmethode toevoegen of wijzigen die zal worden toegepast vanaf de volgende geplande betaling.

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information

Plan Premium
Amount 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date 2021-09-09
Payment Method Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

Een betaalmethode toevoegen

1. Klik op "Betaalmethode wijzigen".

Membership **Billing Info** Redeem

My Plan and Billing Information

Plan Premium
Amount 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date 2021-09-09
Payment Method Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. Klik op "Betaalmethode toevoegen".

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

[+ Add payment method](#)

3. Voer de vereiste informatie in en klik op "Toevoegen".

Add payment method

Card information

 Card number

MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. De nieuw toegevoegde betaalmethode wordt als standaard ingesteld en wordt voor de volgende betaling gebruikt.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

 **** 5556

Default

Expires 11/2021

✕

 **** 4242

Expires 11/2021

...

+ Add payment method

Een betaalmethode wijzigen

1. Klik op het uitgebreide menupictogram naast de betaalmethode die u wilt wijzigen in het dialoogvenster voor facturering.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA	**** 5556	Default	Expires 11/2021	×
VISA	**** 4242		Expires 11/2021	...

+ Add payment method

2. Klik op "Standaard maken" om de geselecteerde kaart als standaard betaalmethode in te stellen.


The screenshot shows the 'Billing' page with the 'PAYMENT METHODS' section. The second payment method (VISA **** 4242) is selected, and a red box highlights the 'Make default' button. The 'Delete' button is also visible below it.

Inwisselen

Registreer de actiecode die als onderdeel van de promotie wordt verstrekt. U kunt het Premium lidmaatschap samen met de actiecode gebruiken.

Registreer actiecode

1. Voer de actiecode in en klik op "Registreren".

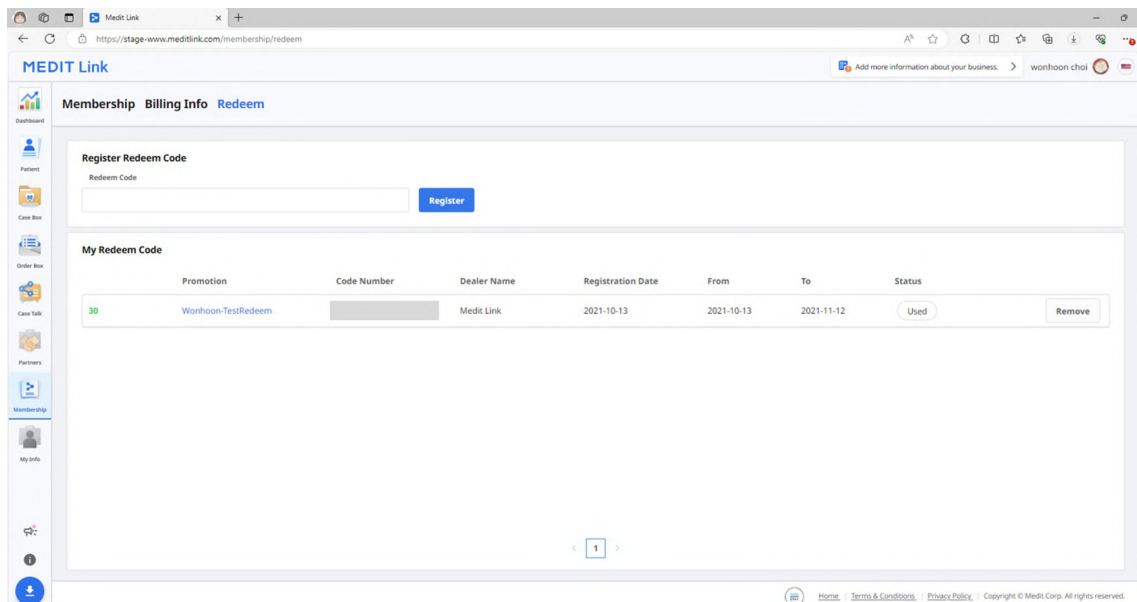

2. Lees de mededeling en kies "Registreren" of "Toepassen" in het pop-up venster.
 - **Registreren:** Registreer de actiecode. U kunt de code na registratie activeren en later gebruiken.
 - **Toepassen:** Registreer en activeer de code. De promotiekorting wordt onmiddellijk toegepast.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
 Register allows you to apply and activate when you need it, If
 applied immediately, it will start after the expiration of the active
 promotion.
 Periodic payments are stopped automatically.

Close
Register
Apply

Activeer actiecode

U kunt meerdere actiecodes registreren, maar u moet de code die u wilt gebruiken activeren.

1. Klik naast de code die u wilt gebruiken op de knop "Activeren".
 - Als er geen code met de status "Activated" is, wordt de code die u kiest onmiddellijk toegepast.
 - Als er al een code is geactiveerd, verandert de nieuw geselecteerde code in de status "Waiting".
 Wanneer de huidige geactiveerde actiecode verloopt, wordt de nieuwe actiecode met de status "Waiting" automatisch geactiveerd.

Opmerking

Er kan slechts één actiecode worden geactiveerd en er kan er ook slechts één de status "Waiting" hebben.

My Info

Mijn account

U kunt de informatie die u tijdens de registratie heeft verstrekt bekijken en wijzigen, en uw lidmaatschapsstatus controleren.

← → ↻ 🌐 www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Account Information



Email Address
seolah.jeon@medit.com [Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
seolah.jeon_dev_admin

Language
English ▼

Country/Region
Korea, Republic of ▼

📘 Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Mijn praktijk/Mijn lab (Alleen beheerdersaccount)

U kunt de informatie over uw praktijk of laboratorium bekijken en wijzigen. Dit gedeelte is alleen beschikbaar voor beheerdersaccounts.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.

We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Mijn scanner

U kunt de informatie over het aangesloten apparaat voor het account controleren.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

No.

Type

Serial Number

Usage Time ⓘ

Last Connected

Last Calibrated

Warranty Start Date

Warranty Expiry Da...

Days Left ⓘ

1

i500

-

-

-

-

-

-

-

2

i500

AA1911104453

0d 7h 18m

2023-04-14 12:48

2020-02-14 15:49

2019-12-02

2021-06-01

Expired

3

i500

AA1911104480

0d 0h 49m

-

2019-11-26 16:33

2019-11-19

2021-05-18

Expired

4

i500

AA1911104481

0d 5h 12m

-

2021-02-16 12:37

2019-11-21

2021-05-20

Expired

5

i700

AZ2105102622

0d 8h 15m

2022-09-21 12:09

2022-09-15 11:25

2021-07-09

2022-07-08

Expired

Buy

6

i700w

BF2112100021

0d 7h 4m

2023-04-03 17:42

2023-03-07 17:29

-

-

-

Buy

7

i700w

BF2202100048

19152d 22h 15m

2023-04-03 18:30

2023-03-24 10:35

-

-

-

Buy

8

i600

BG2202100024

0d 5h 47m

2023-07-31 16:10

2023-06-26 13:43

2022-03-30

2023-03-29

Expired

Buy

9

i600

BG2202100026

0d 5h 40m

2022-09-05 16:34

2022-08-11 11:25

-

-

-

Buy

10

i600

BG2202100029

0d 3h 10m

2022-08-10 11:05

2022-06-16 11:58

-

-

-

Buy

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Ander menu

Mededeling en update

Bekijk belangrijke mededelingen van Medit en updates voor de Medit-software.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Gerelateerde websites

Ontvang allerlei informatie over het gebruik van Medit Link. Krijg toegang tot de educatieve en informatieve hulpmiddelen van Medit, zoals Medit Academy, Medit Academy YouTube en Medit Hulpcentrum.

Need more help?

Medit Academy >

YouTube >

Help Center >


Download Medit Link App

51

U kunt de laatste versie van het installatieprogramma vanaf het web downloaden. Dit menu is nuttig wanneer u het installatieprogramma uit het productpakket kwijt bent, of wanneer u een verouderd installatieprogramma hebt.

 Opmerking

Medit Link wordt automatisch bijgewerkt wanneer u een internetverbinding heeft.

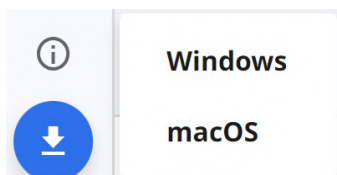

Overzicht

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	Titelbalk	Raadpleeg de Medit Link App > Titelbalk voor gedetailleerde informatie.
2	Menu	Raadpleeg Medit Link App > Menu voor gedetailleerde informatie.
3	Instrumenten en functies	Raadpleeg Medit Link App > Bestandenbekijker en Medit Link App > Weergaveopties voor gedetailleerde informatie.
4	Dossierlijst	Raadpleeg Medit Link App > Filteren en zoeken voor gedetailleerde informatie.

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de beschikbare menu's in elk type praktijk en laboratorium account.

Type account		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Clinic Accounts	Beheerder	O	O	O	X	X	O	O	O
	Lid	O	O	O	X	X	O	O * Alleen herstelfunctie	O
Lab Accounts	Beheerder	X	X	X	O	O	O	O	O
	Lid	X	X	X	O	O	O	O * Alleen herstelfunctie	O

Titelbalk

De titelbalk biedt snelle toegang tot functies zoals accountinformatie, meldingen, mededelingen en updates, instellingen en netwerkstatus.



Mijn informatie

Mijn informatie bevat basisinformatie over de gebruiker zoals profielafbeelding, praktijk- of labnaam, e-mailadres en gebruikersnaam.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

[Log Out](#)

[Close](#)

Meldingen

Bekijk meldingen met betrekking tot samenwerkingsverbanden, bestellingen en werkprocessen.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Order

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

Work

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- | | |
|---|---|
| 1 | Vink het vakje aan om alleen de ongelezen berichten te tonen. |
| 2 | Klik op een melding om onmiddellijk naar het betreffende dossier of de betreffende webpagina te gaan. |

Mededeling & update

Bekijk belangrijke mededelingen van Medit en updates voor de Medit-software.

Instellingen

In het dialoogvenster "Instellingen" kunnen gebruikers het programma configureren.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI
☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Please apply changes.

Apply

Raadpleeg de [Medit Link App > Instellingen](#) voor gedetailleerde informatie over de instellingsopties.

Netwerkstatus

Met Medit Link kunt u alle functies probleemloos gebruiken wanneer u verbonden bent met een netwerk.

Om u te helpen de status van uw netwerkverbinding in realtime te controleren, wordt in de titelbalk het pictogram voor de netwerkstatus weergegeven.

Network Status

Network speed is good.

Network speed is fast enough.

Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.

Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.

Synchronization is in progress. Some case lists may not match.

Synchronization failed. The case lists may not match.

☐ Work Offline

Close

Als de netwerkverbinding niet goed is, kunt u de volgende beperkingen ondervinden:

- Sommige functies zullen beperkt zijn, zoals het bestellen van een dossier, het aanmaken van een dossier, delen via Case Talk en cloudsynchronisatie.
- De algemene prestaties van de dienst kunnen afnemen door de impact van de netwerkomgeving.

In dit geval kunt u overschakelen naar de offline modus om basistaken uit te voeren en vervolgens de functies gebruiken die internet vereisen zodra u weer verbinding heeft.

Opmerking

Het netwerksymbool geeft de reactiesnelheid aan tussen het huidige gebied en AWS (Amazon Web Service). Het geeft niet de snelheid van uw netwerkverbinding weer, dus soms kan het de status als slecht of zwak weergeven, zelfs als uw netwerksnelheid snel genoeg is.

Als het andere proces hetzelfde netwerk gebruikt, kan de snelheid laag of slecht worden weergegeven en kunnen de algemene prestaties van Medit Link slecht zijn. In dit geval wordt aangeraden dat u het netwerk niet met andere processen deelt.

De functie "Ruwe gegevens uploaden" neemt bijvoorbeeld een groot deel van het netwerkproces in beslag. Als het symbool een matige of slechte status aangeeft, ga dan naar Instellingen > Ruwe gegevens uploaden en schakel "Automatisch uploaden" uit.

Instellingen

Algemeen

Biedt opties voor de algemene systeemopstelling.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI

☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

Opslagmap	Geef een map op om de gegevensresultaten op te slaan die door Medit Link en verbonden programma's worden gegenereerd.	
Apps installatiemap	Geef een installatiepad op voor Medit Apps en partner apps die beschikbaar zijn in de App Box.	
Taalinstellingen	Kies de taal voor het programma.	
Tanden labels	Selecteer een etiketteringssysteem voor tanden tussen FDI en VS.	
Meldingen	Indien aangevinkt, ontvangt u meldingen voor programma-updates.	
Ruwe gegevens uploaden	Als deze optie is aangevinkt, worden de ruwe gegevens automatisch naar de cloud geüpload. Dit helpt bij het maken van een back-up van de originele gegevens, zodat u naadloos kunt scannen wanneer u Medit Link gebruikt met hetzelfde account op een andere computer. Het maken van een back-up van de originele gegevens in de cloud is alleen van toepassing op gegevens die zijn verkregen met Medit Scan for Clinics.	
Snelle scan	Kies of u wilt dat de onderstaande scanfasen automatisch verschijnen in Medit Scan for Clinics, zonder dat u de formulierinformatie hoeft in te vullen. • Pre-operatie voor bovenkaak • Pre-operatie voor onderkaak • Gezichtsscan	
Weergaveopties	Geavanceerde rendering	Indien deze optie is aangevinkt, wordt het 3D-model levendiger en realistischer weergegeven.
	Kleurstructuur aanpassen	Pas de helderheid van het 3D-model aan. *De resulterende kleuren kunnen enigszins afwijken van die in Medit Link wanneer u dezelfde gegevens opent met andere software.
Medit gebruikerservaring verbeteringsprogramma	Neem deel aan het Medit gebruikerservaring verbeteringsprogramma. • Wij gebruiken de verzamelde informatie om onze producten en diensten te verbeteren. • We verzamelen geen informatie waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd.	
Standaardpagina na inloggen	Selecteer het standaardmenu dat bij het starten van het programma moet worden weergegeven. • Clinic accounts kunnen kiezen tussen Patient en Case Box • Lab accounts kunnen kiezen tussen In Box en Work Box	

Opslagbeheer

Controleer en beheer de lokale en cloudopslagruimte.

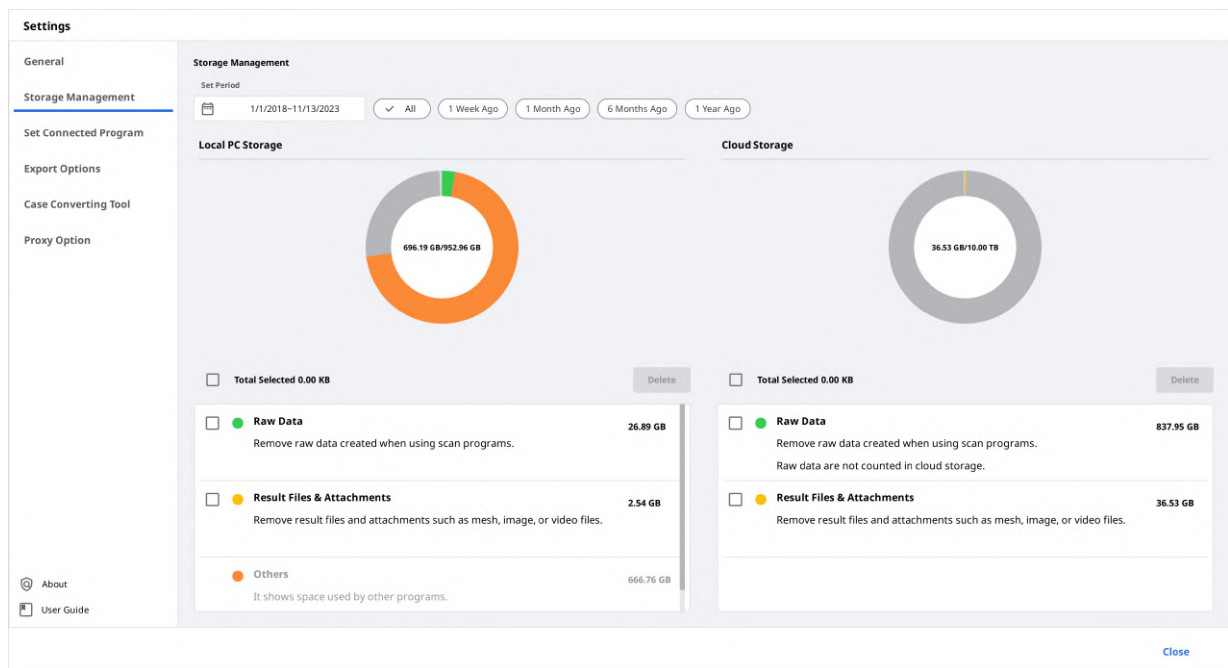

Periode instellen

Stel de specifieke periode in voor het verwijderen van gegevens die zijn aangemaakt binnen het tijdsbestek hieronder.

- Alle: Bekijk alle bestanden.
- 1 week geleden: Bekijk de bestanden die een week geleden zijn aangemaakt.
- 1 maand geleden: Bekijk de bestanden die een maand geleden zijn aangemaakt.
- 6 maanden geleden: Bekijk de bestanden die zes maanden geleden zijn aangemaakt.
- 1 jaar geleden: Bekijk de bestanden die een jaar geleden zijn aangemaakt.

Lokale opslag

Beheer de opslagruimte van de computer.

Ruwe gegevens	Verwijder de geselecteerde ruwe gegevens van uw computer. Als de ruwe gegevens al naar de cloud zijn geüpload, kunt u ze downloaden en wanneer u maar wilt gebruiken.
Resultaat en bijlage	Verwijder de resultaat- en bijlagebestanden van de pc, zoals mesh, afbeeldingen en video's. Als deze bestanden al naar de cloud zijn geüpload, kunt u ze downloaden en wanneer u maar wilt gebruiken.
Anderen	Bekijk de bestanden die worden gebruikt om het systeem en andere programma's te bedienen. Het toont de opslag van uw computer. U kunt deze bestanden niet in Medit Link wissen.
Wissen	Verwijder geselecteerde bestanden van de computer.

Cloudopslag

Beheer de cloudopslagruimte.

Ruwe gegevens	De ruwe gegevens nemen geen opslagruimte in beslag, dus zijn ze niet in het cirkeldiagram te zien. Indien nodig kunt de ruwe gegevens van hieruit beheren, bijvoorbeeld door ze te verwijderen om de privacy van de patiënt te beschermen.
Resultaat en bijlage	De resultaten en bijlagen nemen ruimte in beslag in de cloudopslag. Als de cloud vol is, kunt u meer opslagruimte vrijmaken door onnodige bestanden te verwijderen.
Koop opslag	Als u een standaardplan heeft, overweeg dan om op Premium over te stappen voor meer cloudopslag.
Wissen	Verwijder geselecteerde bestanden uit de cloudopslag om opslagruimte vrij te maken.

Stel verbonden programma in

Beheer de programma's die integratie in Medit Link ondersteunen.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

 About

User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒ **Medit Scan for Clinics**

C:/ReleaseBuild/3.3.0.100_Release/Medit_JScan.exe

Apply

Close

U kunt de volgende programma's verbinden:

	Clinic Account	Lab Account
Scanprogramma	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

Opmerking

De volgende diensten kunnen niet worden geïntegreerd in Medit Link voor Mac.

- [Medit Scan for Labs](#)

Export opties

Stel in hoe bestanden uit Medit Link moeten worden geëxporteerd.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name


Apply

Close

CAD-type	Kies het CAD-programma dat u wilt gebruiken voor het ontwerpen. Het programma past de resultaten automatisch aan op basis van uw keuze, waardoor u zonder extra asuitlijning verder kunt gaan met het ontwerp.
Exporteer bestanden naar	Geef het pad op waar u de resultaten wilt opslaan.
Meshformaat	Specificeer het formaat van het afgewerkte mesh-bestand.
Afbeeldingsformaat	Geef het formaat aan van de geëxporteerde afbeeldingsbestanden.
Comprimeren en samenvoegen	Bestanden comprimeren: Comprimeer alle resultaten tot één bestand. Combineer individuele mesh: Combineer alle resultaten voor de bovenkaak of onderkaak in één bestand. Wanneer u bepaalde programma's gebruikt die niet in staat zijn om meerdere bestanden te importeren en te verwerken, kunt u deze bestanden samenvoegen tot één bestand, zodat u ermee kunt werken in die programma's.
Opties wanneer dezelfde map of hetzelfde bestand al bestaat.	Kies de standaardactie voor dossiers waarin dezelfde map of bestandsnaam bestaat in het doelpad. • Altijd vragen bij exporteren. • Exporteer een nieuw bestand en overschrijf de bestaande bestanden. Het huidige opgeslagen bestand gaat verloren. • Maak een map aan en exporteer de bestanden
Regel voor mapnaam	Stel regels op voor het benoemen van mappen bij het exporteren van bestanden. De regels die u instelt, worden toegepast op de mapnaam en het geëxporteerde bestand wordt opgeslagen in de aangemaakte map. De onderstaande informatie kan worden gebruikt om de regel in te stellen. • Clinic-account Aanmaakdatum van dossier, Scandatum, Besteldatum, Patiëntnaam, Dossiernaam, Partnernaam, Patiënt-ID, Order-ID • Lab-account Aanmaakdatum van dossier, Scandatum, Besteldatum, Patiëntnaam, Dossiernaam, Partnernaam, Order-ID
Regel voor bestandsnaam	Stel regels in voor de naam van het geëxporteerde bestand. De onderstaande informatie kan worden gebruikt om de regel in te stellen. • Clinic-account Aanmaakdatum van dossier, Scandatum, Besteldatum, Patiëntnaam, Dossiernaam, Partnernaam, Patiënt-ID, Order-ID • Lab-account Aanmaakdatum van dossier, Scandatum, Besteldatum, Patiëntnaam, Dossiernaam, Partnernaam, Order-ID

Dossier omzet instrument


U kunt dossiers tussen verschillende accounts verplaatsen door bestaande dossiers van het account te exporteren of door dossiers te importeren die zijn geëxporteerd vanuit andere accounts.

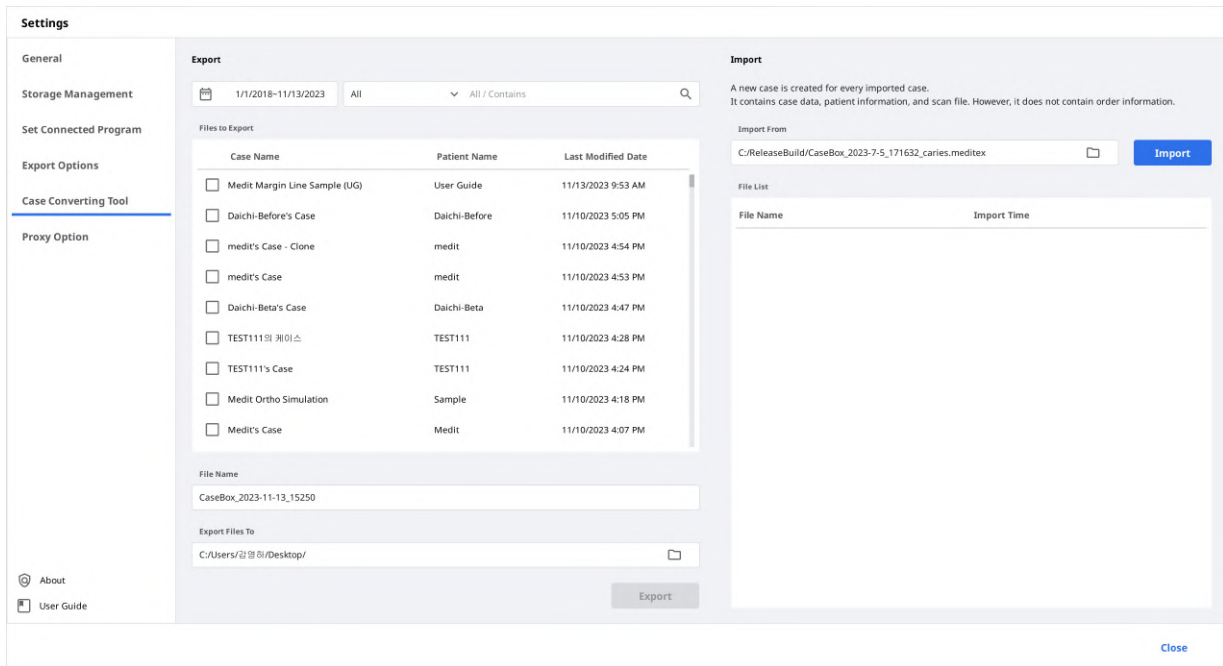


Dossier exporteren

Exporteer dossiers vanuit het huidige ingelogde account naar de lokale pc.

1. Open Medit Link en klik op het pictogram "Instellingen".

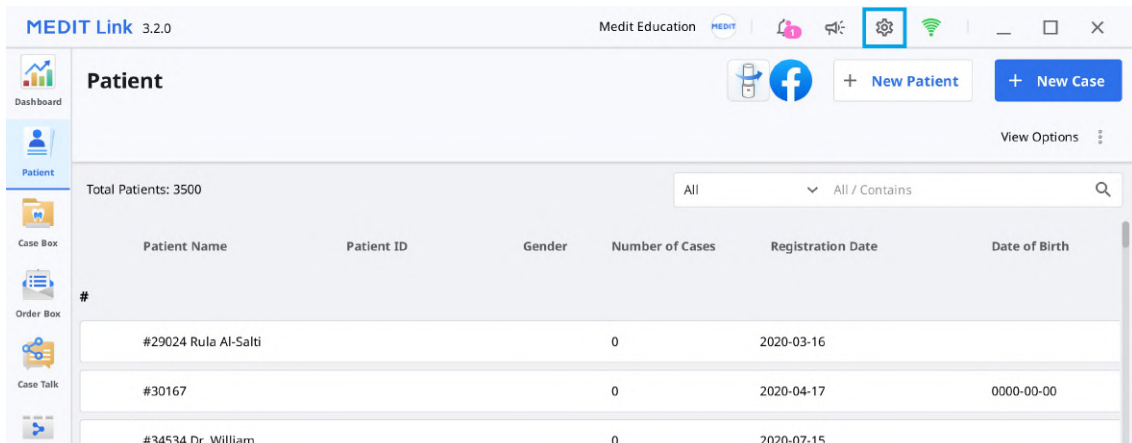

2. Kies in het linkermenu "Dossier omzet instrument".

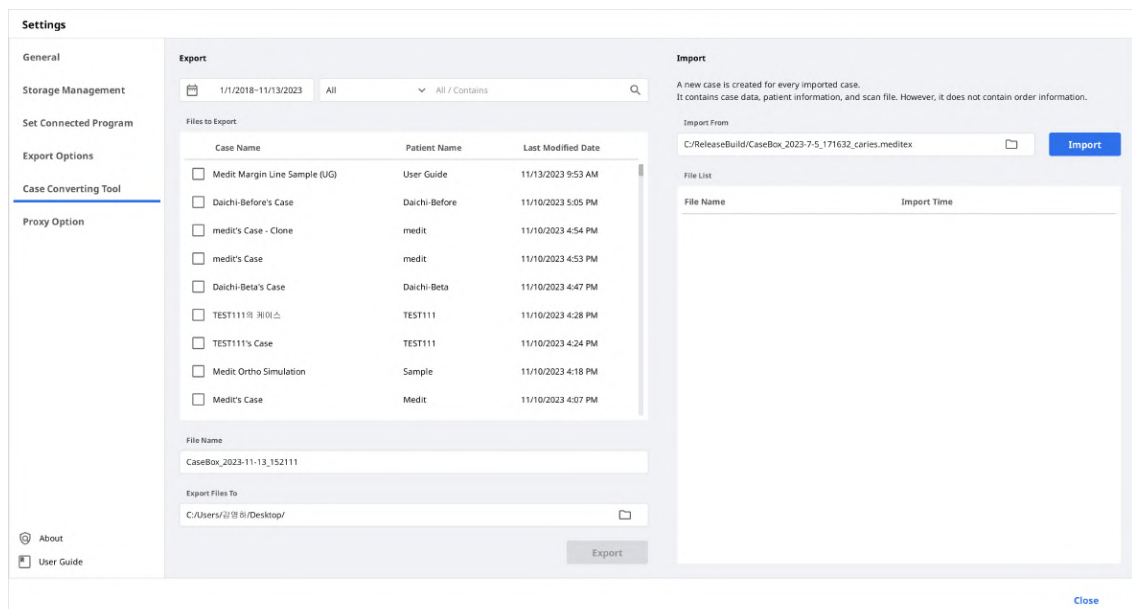

3. Stel in het gedeelte "Exporteren" een periode in of zoek indien nodig naar te exporteren dossiers.

4. Kies de dossiers die u wilt exporteren uit de lijst in het gedeelte "Te exporteren bestanden".

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☒ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM

5. Stel de bestandsnaam in door de dossiernamen in het veld "Bestandsnaam" te wijzigen.
6. Stel de bestemmingsmap in om de geselecteerde dossiers te exporteren.
7. Klik op "Exporteren".
8. Klik op "Ja" om de map waarin het bestand wordt geëxporteerd te openen.

Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No


Yes

9. De geëxporteerde dossiers worden opgeslagen in het bestandsformaat .meditex.


Dossier importeren

1. Open Medit Link en klik op het pictogram "Instellingen".


2. Kies in het linkermenu "Dossier omzet instrument".

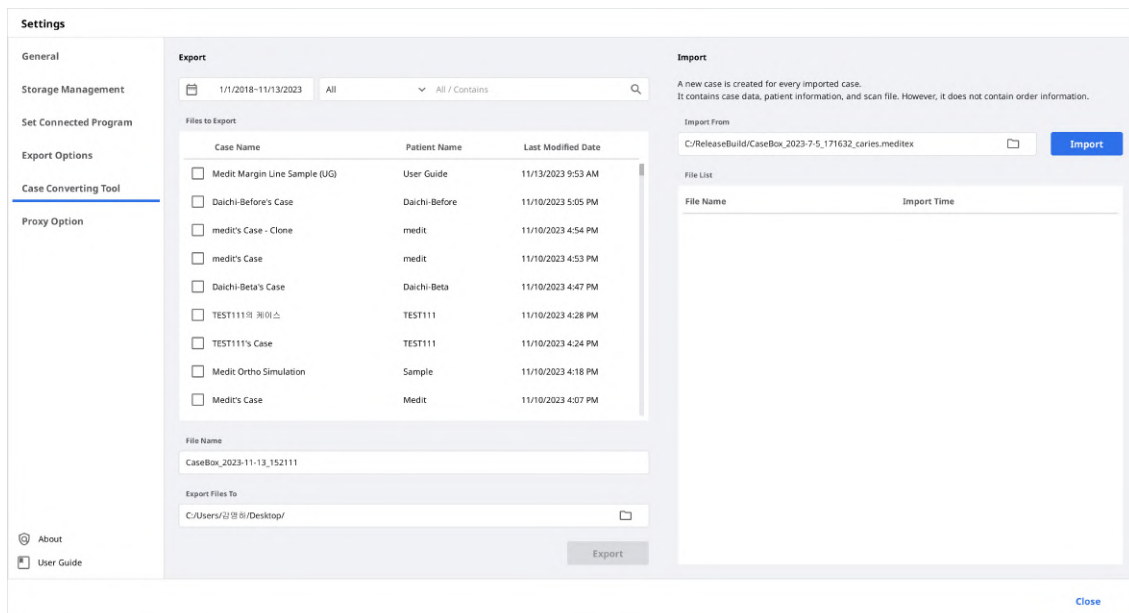

- Klik in het gedeelte "Importeren" op het mappictogram om op uw computer te zoeken naar het .meditex-bestand dat u wilt importeren.

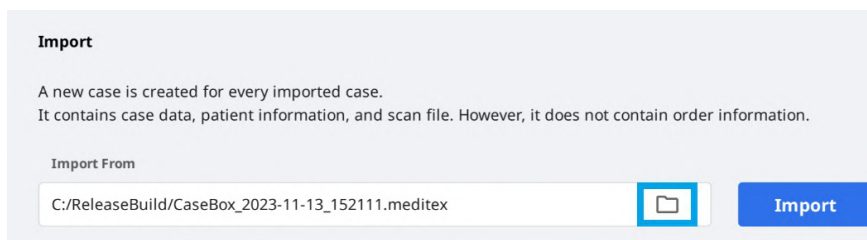

- Klik op de knop "Importeren" en vink de te importeren bestanden in de onderstaande lijst aan.

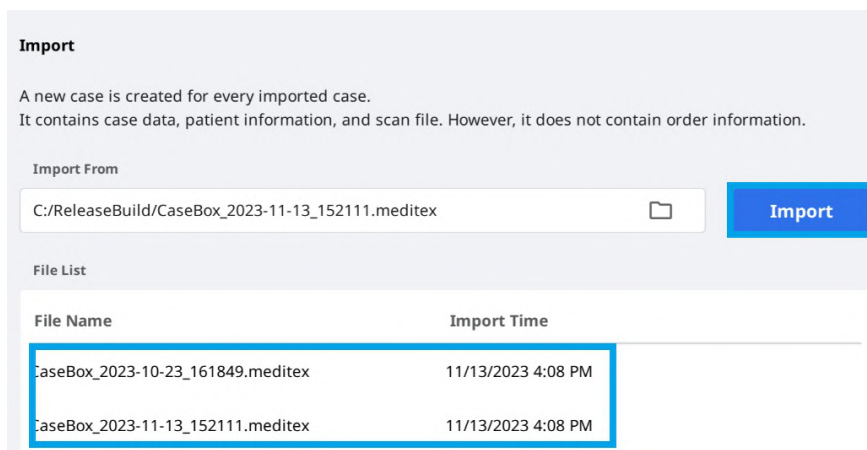

- Het geïmporteerde dossier verschijnt ook in uw Case Box (Clinic-account) of Work Box (Lab-account).

Proxy-opties

In sommige beperkte netwerkomgevingen kunt u de netwerkinstellingen wijzigen.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

☐ HTTP
☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

Over

Toon gedetailleerde informatie over Medit Link.

About

MEDIT Link

v 3.2.0 Build 178

Operation Korea

<https://www.medit.com/>

Copyright Medit Corp. All rights reserved.

Terms & Conditions

Open Source License

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Gebruikershandleiding


Ontvang de gebruikershandleiding voor Medit Link.

Voor het openen van de gebruikershandleiding is een internetverbinding nodig.

Menu

Dashboard

U kunt de statistieken van alle werkzaamheden op Medit Link bekijken in de vorm van grafieken en overzichten, zowel in de Medit Link App als op het web.

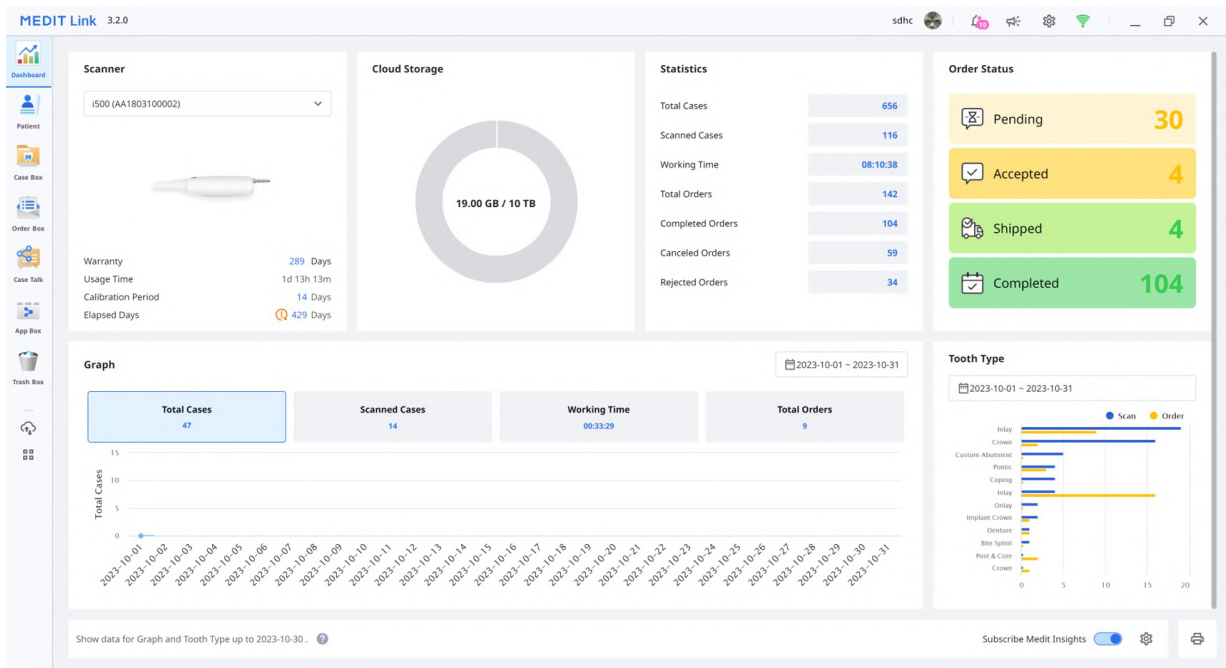

Opmerking

Raadpleeg het [Medit Link Web > Dashboard](#) voor meer informatie over het dashboard en Medit Insights.

Patient

In het menu Patient kunt u patiënten toevoegen, bewerken, verwijderen of samenvoegen.

Patient

Total Patients: 106

All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	Actions
KELLY				1	2021-07-02	Scan
Medit Sample				4	2023-11-05	Scan
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17	Scan
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09	Scan
Michele Rinn				3	2021-04-26	Scan
newpatient				1	2022-10-13	Scan
ORG_[Clinics][2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14	Scan
Order Test - Change Name				2	2023-07-24	Scan

Nieuwe patiënt toevoegen

1. Klik op "Nieuwe patiënt".

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female

☐ Male

Date of Birth

yyyy

mm

dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel

Save


2. Vul de vereiste informatie in het dialoogvenster Nieuwe patiënt in en klik op "Opslaan".

Patiënt wissen

Opmerking

U kunt een patiënt alleen wissen als er geen dossiers voor de patiënt zijn.

1. Selecteer de patiënt die u uit de lijst wilt wissen.

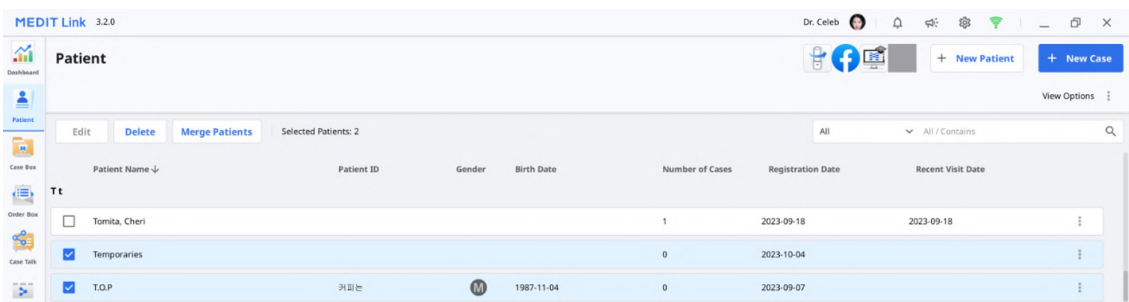


Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
☐ Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
☒ Temporaries				0	2023-10-04	
☒ T.G.P.	카미론	M	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. Klik op "Wissen".

Patiënten samenvoegen

U kunt alle dossiers van meerdere patiënten samenvoegen tot één patiënt.

1. Selecteer de patiënten die u wilt samenvoegen uit de lijst.

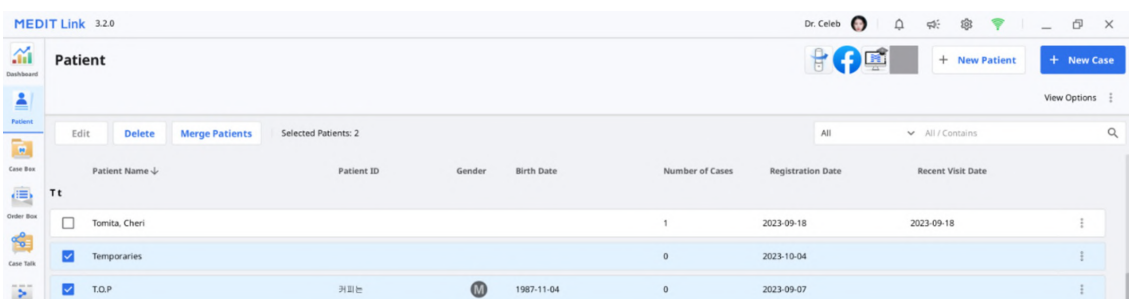

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
☐ Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
☒ Temporaries				0	2023-10-04	
☒ T.G.P.	카미론	M	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. Klik op "Patiënten samenvoegen".
3. Selecteer de doelpatiënt waarvoor u alle dossiers wilt samenvoegen.
4. Alle dossiers worden samengevoegd tot één doelpatiënt en de patiëntinformatie van de doelpatiënt wordt behouden.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

[Cancel](#)
[Apply](#)

5. Klik op "Toepassen" om door te gaan met het samenvoegen.

Case Box/Work Box

1 Toon de dossiernamen en de patiëntnamen.

2 Biedt de belangrijkste beschikbare functies: Scan- of openknop, bestelknop, app-pictogrammen.

3 Toon beschikbare tabbladen: Formulier, Bestandenbekijker.

4 Toon functies voor het beheer van dossiers en bestanden.

5 Toon de gebruikersinterface voor de formulierregistratie voor het geselecteerde scanprogramma.

6 Geef de gebruikers informatie over het type, de methode, het materiaal en de tint die beschikbaar zijn voor het geselecteerde tandnummer, zodat ze een keuze kunnen maken.

7 Toon informatie over het type, de methode, het materiaal en de tint die zijn toegepast op de geselecteerde tanden.

Tabbladen in Case Box/Work Box

Formulier	Bestandenbekijker
Het tabblad Formulier bevat een gebruikersinterface waarop basisinformatie voor het scannen kan worden ingevoerd, zoals het type, de methode en het materiaal voor de tandnummers, evenals de scanopties. De informatie die u invoert, wordt doorgegeven aan het verbonden scanprogramma en gebruikt als orderinformatie wanneer u een order plaatst bij uw partner.	Bekijk resultaatbestanden die door scanprogramma's en CAD zijn gegenereerd. De bestandenbekijker toont en beheert de verkregen of bijgevoegde 3D-modellen en 2D-afbeeldingen.

Funcities in Case Box/Work Box

De volgende functies zijn beschikbaar in Case Box/Work Box.

	Dossierstatus	Toont de status van het dossier.								
	Ga naar Order Box/In Box	Biedt een sneltoets voor hetzelfde dossier in een andere box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).								
	Dossierinformatie	Bekijk de details van het dossier en sla ze op als PDF-bestand of print ze uit.								
	Notitie en tags	Voeg notities of tags toe bij het registreren of bestellen van een dossier. Gebruik ze om aanvullende informatie over het dossier aan uw partners mee te delen.								
	Dossiergeschiedenis	Biedt gedetailleerde informatie over de dossiergeschiedenis. History <table><tr><td>Last Modified Date</td><td>3/29/2022 1:57 PM</td></tr><tr><td>Scanning Date</td><td>4/12/2021 2:06 PM</td></tr><tr><td>Creation Date</td><td>3/22/2022 1:17 PM</td></tr></table> <table><tr><td>Case Size</td><td>435MB</td></tr></table> Close	Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM	Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM	Creation Date	3/22/2022 1:17 PM	Case Size	435MB
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM									
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM									
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM									
Case Size	435MB									
	Wissen	Wis het dossier. U kunt bestelde dossiers of offline aangemaakte dossiers niet wissen.								
	Kopieer	Maak een kopie van het huidige dossier in Case Box. Alle gegevens worden gekopieerd naar het gekloonde dossier. Deze functie is handig bij het kopiëren van behandelingsinformatie voor dezelfde patiënt of bij het maken van een extra order met dezelfde informatie of bestanden.								
	Bijvoegen	Voeg bestanden bij in verschillende formaten.								
	Exporteren	Exporteer scan- of CAD-resultaatbestanden naar de lokale pc. Bij het exporteren van bestanden heeft u de mogelijkheid om het gewenste bestandsformaat te kiezen. De geëxporteerde bestanden kunnen worden geïmporteerd in CAD- en CAM-software voor verdere bewerking.								
	Delen	Maak een link aan om te delen. Gebruikers die de gedeelde link hebben, hebben toegang tot de 3D-gegevens in een webbrowser zoals Chrome, Firefox of Safari, zonder dat er extra programma's geïnstalleerd hoeven te worden. U kunt de link met iedereen of alleen met specifieke personen delen. Er kan een pincode of een vervaldatum voor links worden ingesteld om privégegevens te beveiligen.								
	Verstuur ondersteuningsverzoek	Ga naar het Medit Hulpcentrum om het ondersteuningsverzoek in te dienen.								

Order Box/In Box

Type	Method	Material	Shade
11 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
12 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
13 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
14 Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

1	Toon de dossiernaam en de patiëntnaam.
2	Biedt functies voor orderbeheer (accepteren/annuleren; bezorgen/ontvangen).
3	Toon beschikbare tabbladen: Order, Bestandenbekijker.
4	Toont functies voor het beheer van dossiers en bestanden: dossierstatus, sneltoetsen voor gedetailleerde informatie, dossierinformatie, notitie en tags, etc.
5	Toon de gedetailleerde informatie voor de order, waaronder het ordernummer, de patiëntnaam, de partnernaam, de scandatum, de orderdatum, de bezorgdatum, en de notitie en tags.
6	Toon de bestelde productinformatie en de bezorgstatus.

Tabbladen in Order Box/In Box

Order	Bestandenbekijker
Controleer de gedetailleerde informatie over de order, zoals ordernummer, patiëntnaam, accountnaam, scandatum, orderdatum, bezorgdatum, notitie en tags.	Bekijk bestanden die zijn gegenereerd door scan/CAD-werkzaamheden. De bestandenweergever toont en beheert de verworven of bijgevoegde 3D-modellen en 2D-afbeeldingen.

Case Talk

De dossiers die in Medit Link zijn aangemaakt, kunnen worden gedeeld met specifieke mensen. Iedereen met de gedeelde link of geregistreerde leden van Medit Link.

De gebruiker kan via Case Talk in zowel de Medit Link App als Medit Link Web een lijst zien van alle gedeelde dossiers.

Opmerking

Case Talk vereist een internetverbinding.

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date ↓	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolahjeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

Gedeelde dossiers kunnen worden bekeken via een webbrowser zonder dat er een apart programma geïnstalleerd hoeft te worden. Dit maakt eenvoudige communicatie over 3D-gegevens op verschillende apparaten mogelijk.

App Box

App Box biedt diverse add-in programma's die uw basisscanworkflow verrijken en de productiviteit verhogen. U kunt de aangeboden apps downloaden en installeren om tandheelkundige producten te maken, scangegevens te analyseren, u te helpen tijdens een consult, of uw werkproces te optimaliseren.

Alle


Het tabblad "Alle" toont een lijst met alle beschikbare apps, inclusief apps ontwikkeld door Medit (Medit Apps) en partner apps. Deze partner apps zijn integraties met verschillende sectoren van de digitale tandheelkunde, zoals 3D-printen, CAD/CAM-software, etc.

Medit Apps

Het tabblad "Medit Apps" toont alleen de lijst met door Medit ontwikkelde apps.

Gedownload

Het tabblad "Gedownload" toont een lijst van momenteel geïnstalleerde apps op uw pc, evenals apps die in het verleden zijn gedownload met het gebruikersaccount.

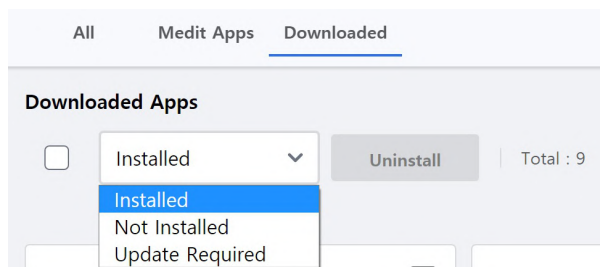

- **Geïnstalleerd:** Deze optie toont alleen apps die geïnstalleerd zijn op de pc waarop de gebruiker momenteel is aangemeld.
- **Niet geïnstalleerd:** Met deze optie kunt u apps zien die u op andere pc's heeft geïnstalleerd, zodat u ze snel kunt installeren.
- **Update vereist:** Deze optie toont alleen apps die op de huidige pc geïnstalleerd zijn en bijgewerkt moeten worden.

Trash Box

In de Trash Box worden de verwijderde dossiers tijdelijk bewaard. Elk dossier in de Trash Box kan worden hersteld of definitief worden verwijderd.

⚠ Let op

De uit de Trash Box verwijderde gegevens worden permanent van uw computer en de server verwijderd en kunnen niet worden hersteld.

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
Scan Completed	Jira_인물판트 46, 47's Case - Clone - Clone	인물판트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Dossier synchronisatiebeheerder

[illegible]

Totaal dossiers / Geselecteerde dossiers	Controleer het aantal van alle/geselecteerde dossiers die moeten worden geüpload.
Alles uploaden	Upload alle dossiers naar de cloud.
Alles annuleren	Annuleer alle uploadverzoeken.
	Upload het dossier naar de cloud.
	Uploaden van het dossier annuleren.
	Probeer het dossier opnieuw te uploaden.

76


Totaal dossiers / Geselecteerde dossiers	Controleer het aantal van alle/geselecteerde dossiers die moeten worden gedownload.
Alles downloaden	Download alle dossiers naar de computer.
Alles annuleren	Annuleer alle downloadverzoeken.
	Download het dossier naar de computer.
	Annuleer het downloaden van het dossier.
	Probeer het dossier opnieuw te downloaden.

Gerelateerde websites

U kunt direct naar menu's gaan die alleen beschikbaar zijn op Medit Link Web, zoals My Info, Partners en Membership. Raadpleeg Medit Link > Medit Link Web > [Partners](#), [Membership](#) en [My Info](#) voor een gedetailleerde beschrijving van de Medit Link Web-menu's.

U heeft toegang tot de webwinkel van Medit, Medit Shop, waar u verlengde garanties voor scanners en andere Medit-producten, zoals rugzakken voor scanners, kunt aanschaffen.

U kunt ook allerlei informatie krijgen over het gebruik van Medit Link. Krijg toegang tot de educatieve en informatieve hulpmiddelen van Medit, zoals het Medit Hulpcentrum, het YouTube-kanaal van Medit Academy en het online leerplatform Medit Academy.

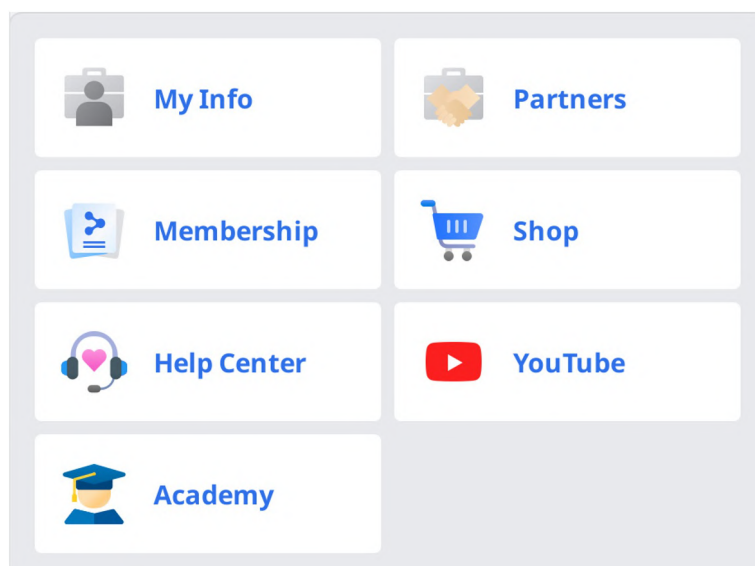

Bestandenbekijker

De bestandenbekijker groepeerd en toont verschillende gegevens, waaronder de gegevens van programma's die met Medit Link zijn verbonden en gegevens die door gebruikers zijn toegevoegd.


Het biedt standaard beheerfuncties zoals het tonen/verbergen van gegevens, het aanpassen van de ondoorzichtigheid en het wissen van gegevens.

Het ondersteunt voorbeelden van bestanden in de volgende formaten:

- 3D-gegevens: STL, OBJ, PLY
- 2D-afbeeldingen: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Videobestanden: MKV, MP4, AVI, WMV

Gegevensboom

U kunt alle gegevens voor het dossier groeperen en weergeven in de gegevensboom. U kunt ook gegevens tonen/verbergen, de transparantie aanpassen en gegevens uit de gegevensboom wissen.

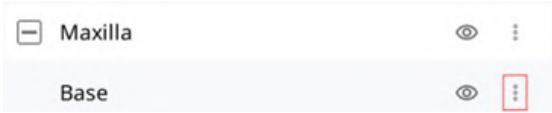	Toon/Verberg	U kunt de gegevens tonen of verbergen.
	Ondoorzichtigheid	De schuifbalk verschijnt wanneer u op een van de gegevens in de gegevensboom klikt. U kunt de ondoorzichtigheid van de getoonde gegevens aanpassen door de schuifbalk te verplaatsen. 
	Meer	Als u op het pictogram "Meer" klikt, verschijnen er extra functies.  • Alleen deze weergeven: Verberg alle andere gegevens en toon alleen de overeenkomstige gegevens. • Verbergen: Verberg de gegevens. • Kopiëren: Kopieer de gegevens en voeg ze toe aan de bijlagengroep. • Exporteren: Exporteer de geselecteerde bestanden. • Hernoemen: Verander de naam van de gegevens. • Wissen: Wis de gegevens.

Opmerking


U kunt gegevens alleen online hernoemen.

Instrumenten voor modelcontrole


3D-model beheren

	Verplaatsen	Verplaats het model.
	Roteren	Roteer het model.
	In-/uitzoomen	Zoom in en uit op het model.
	Zoom aanpassen	Plaats model in het midden van het scherm.
	Modelweergave modus	Structuur aan
		Structuur uit
	Rasterinstellingen (mm)	Raster aan
		Overlay aan
		Raster uit
		Verberg het raster.


Toon gegevens in echte structuurkleuren.

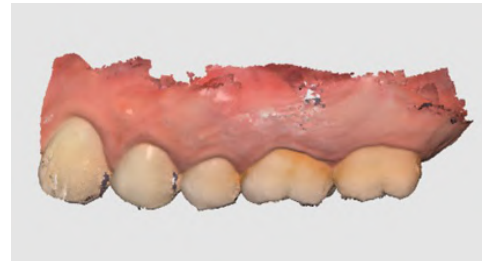


Toon gegevens in een enkele kleur.

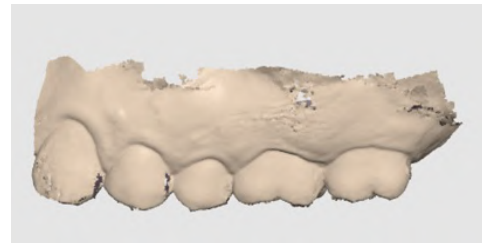

Toon het raster op de achtergrond.

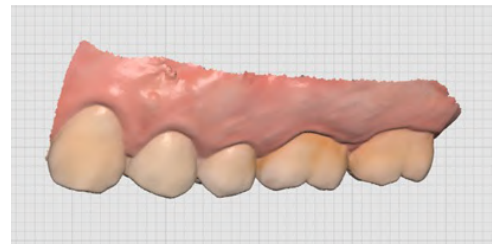

Plaats het raster over het model.

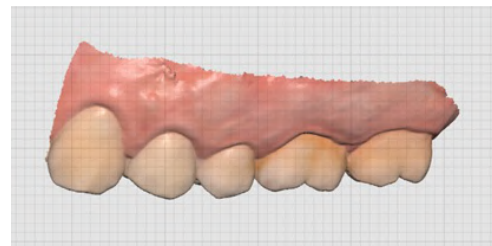

2D-afbeeldingen beheren


< >	Volgende/vorige afbeelding	Beweeg tussen afbeeldingen.
	Bewerken	Bewerk de afbeelding.
 	Venster losmaken/aanpassen	Maak het afbeeldingsvenster los en verplaats het naar de gewenste positie. Wijzig het formaat van het venster. Wanneer het venster op zijn oorspronkelijke plaats wordt teruggezet, krijgt het zijn standaardgrootte terug.

Funcie-instrumenten

Beeldopname en notitie


Leg het huidige scherm vast als een 2D-afbeelding. U kunt erop tekenen of notities toevoegen.


U kunt het als bestand met uw notities opslaan en als referentie opsturen.

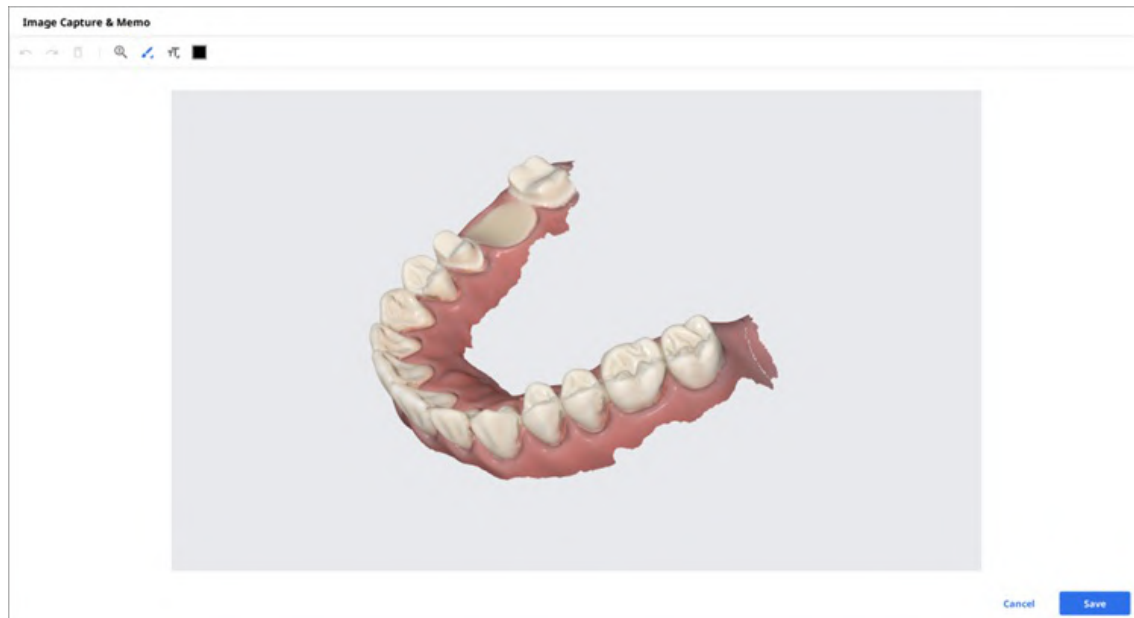

Ortho-opname


Leg de beelden vast in de huidige weergaverichting, evenals boven/onder/links/rechts vanuit de huidige weergaverichting.

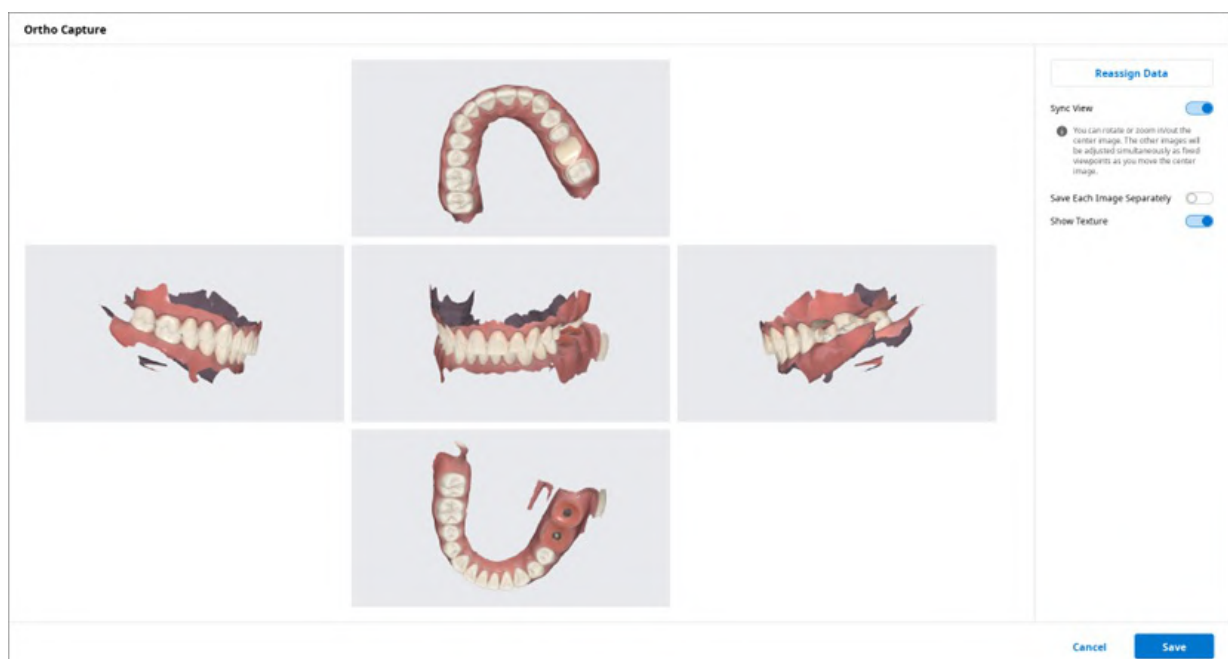

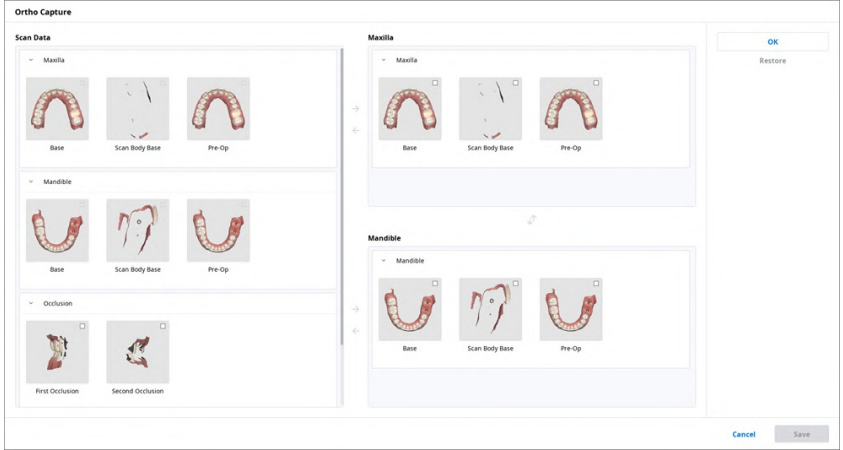Sync-weergave	Indien ingeschakeld, kunt u de middelste afbeelding roteren, of erop in- en uitzoomen. De andere afbeeldingen worden tegelijkertijd aangepast als vaste weergaverichtingen terwijl u de middelste afbeelding verplaatst. Indien uitgeschakeld, kunt u alle afbeeldingen afzonderlijk verplaatsen, roteren of erop in- en uitzoomen.
Elke afbeelding apart opslaan	Sla elke afbeelding op in hoge resolutie.
Structuur tonen	Schakel de structuur van het model in of uit.
Gegevens opnieuw toewijzen	Wijzig de gegevens voor de bovenkaak/onderkaak met de functie "Gegevens opnieuw toewijzen". U kunt de gewijzigde gegevens gebruiken om de resultaatafbeeldingen van Ortho-opname te maken en te gebruiken.  • Scangegevens: Alle scangegevens van het dossier worden weergegeven. • Bovenkaak: De door u geselecteerde gegevens voor de bovenkaak worden weergegeven. • Onderkaak: De door u geselecteerde gegevens voor de onderkaak worden weergegeven.


Gaten vullen

Vul gaten in 3D-meshgegevens.

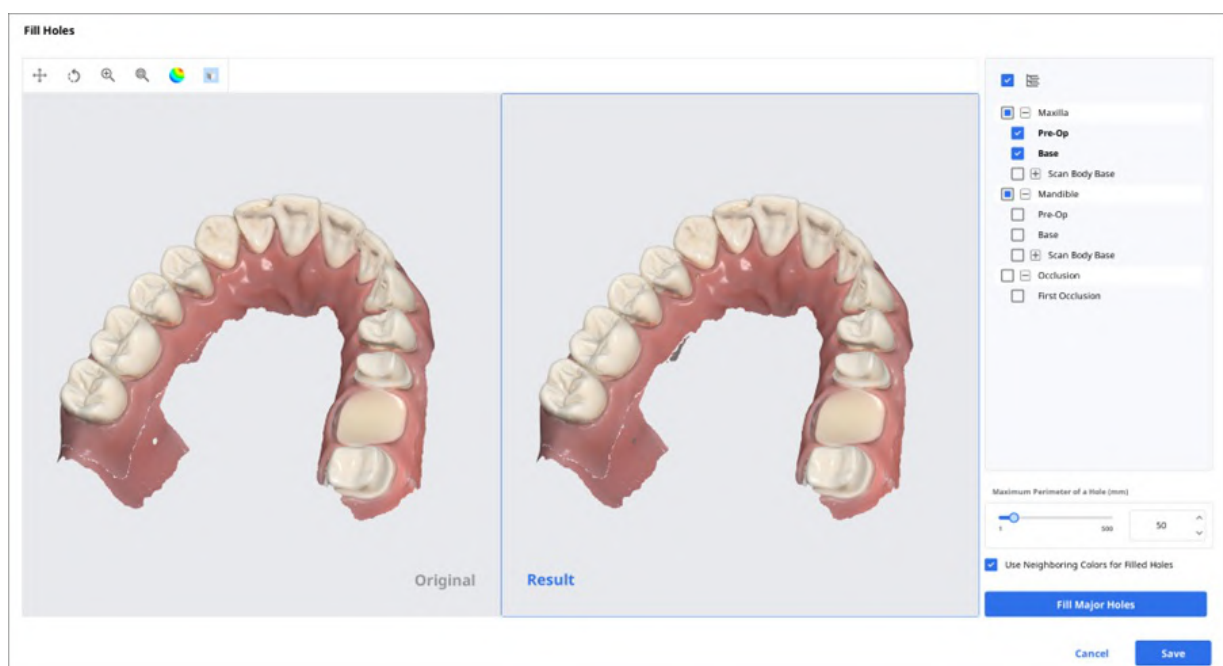

Bijknippen


Bijknippen biedt verschillende instrumenten om gegevens te bewerken.

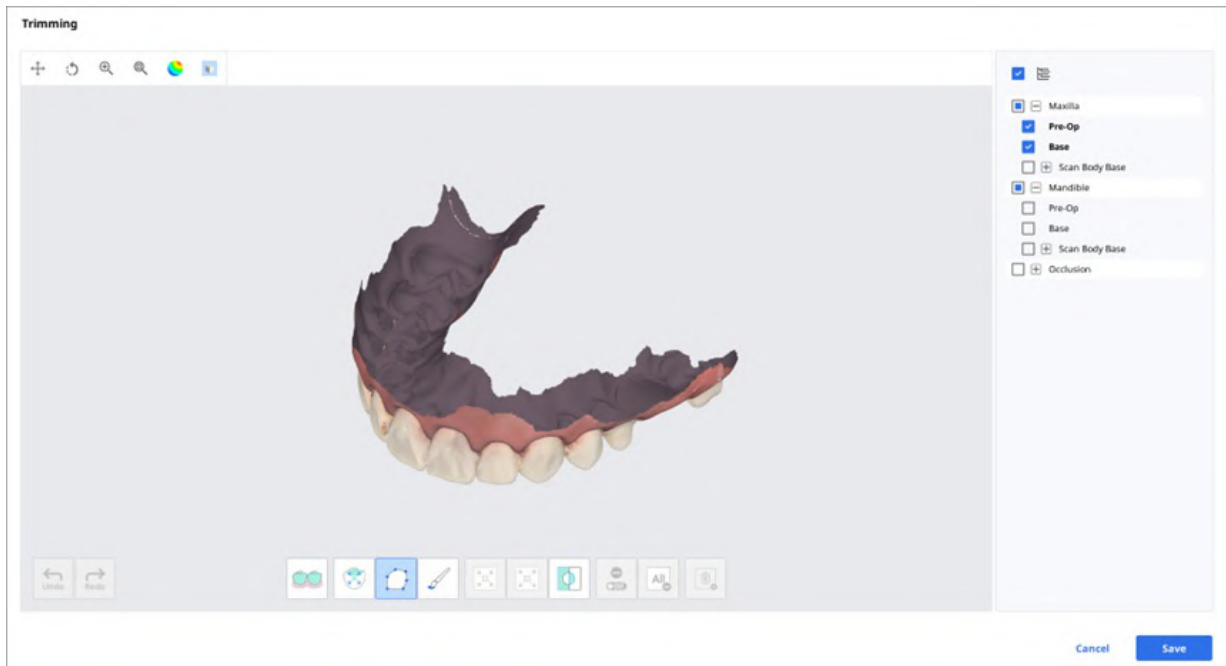

De geselecteerde 3D-meshgegevens kunnen met verschillende instrumenten onderin het venster worden bewerkt.

Selectie		Slimme tandselectie	Selecteer automatisch alle tanden van de boog, zonder het tandvlees.  Opmerking Deze functie is alleen beschikbaar voor de scangegevens die zijn verkregen door Medit Scan for Clinics met de optie "GPU gebruiken" ingeschakeld.
		Slimme enkele tandselectie	Selecteer het gebied van een enkele tand automatisch met één klik. U kunt op de tand klikken of slepen.
		Polylijnselectie	Selecteer alle objecten binnen de getekende polylijnvorm op het scherm.
		Kwastselectie	Selecteer alle objecten op een uit de vrije hand getekend pad op het scherm. Alleen de voorkant wordt geselecteerd. De kwast is beschikbaar in drie verschillende maten.
Aanpassing van geselecteerd gebied		Verklein het geselecteerde gebied	Verklein het geselecteerde gebied elke keer als u op de knop drukt.
		Vergroot het geselecteerde gebied	Vergroot het geselecteerde gebied elke keer als u op de knop drukt.
		Keer het geselecteerde gebied om	Selectie omkeren.
Deselectie		Selectie/Deselectie	Indien ingeschakeld, kunt u met behulp van verschillende instrumenten het geselecteerde gebied deselecteren.
		Wis alle selecties	Wis alle geselecteerde gebieden.
		Geselecteerd gebied wissen	Wis de gegevens uit het geselecteerde gebied.


1. Selecteer het gebied dat u wilt bijknippen met de instrumenten voor gebiedsselectie.

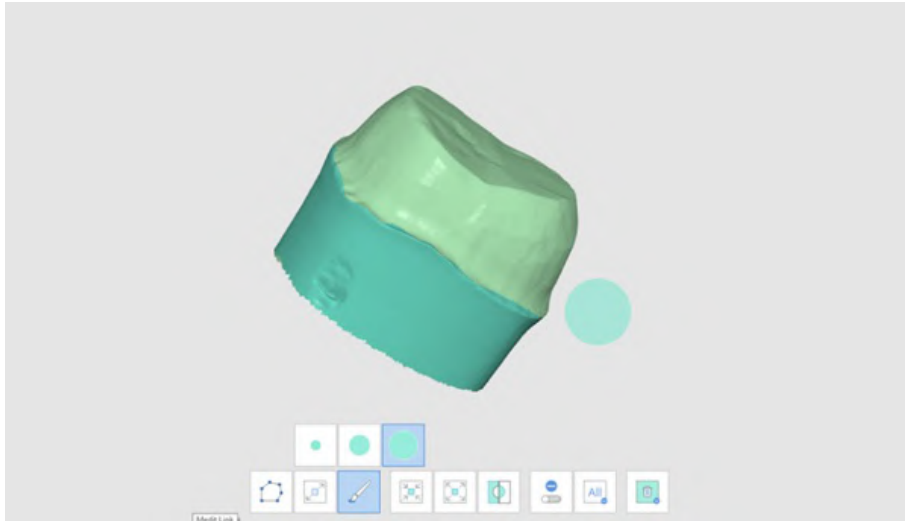


Opmerking

Het polylijn bijknippen instrument selecteert alle onderdelen binnen een polylijnvorm die op het scherm getekend is, terwijl het kwast bijknippen instrument alleen gezichtsgegevens aan de voorkant selecteert.


2. Met de volgende drie instrumenten kunt u de selectie omkeren, verkleinen of vergroten.
 - Keer het geselecteerde gebied om

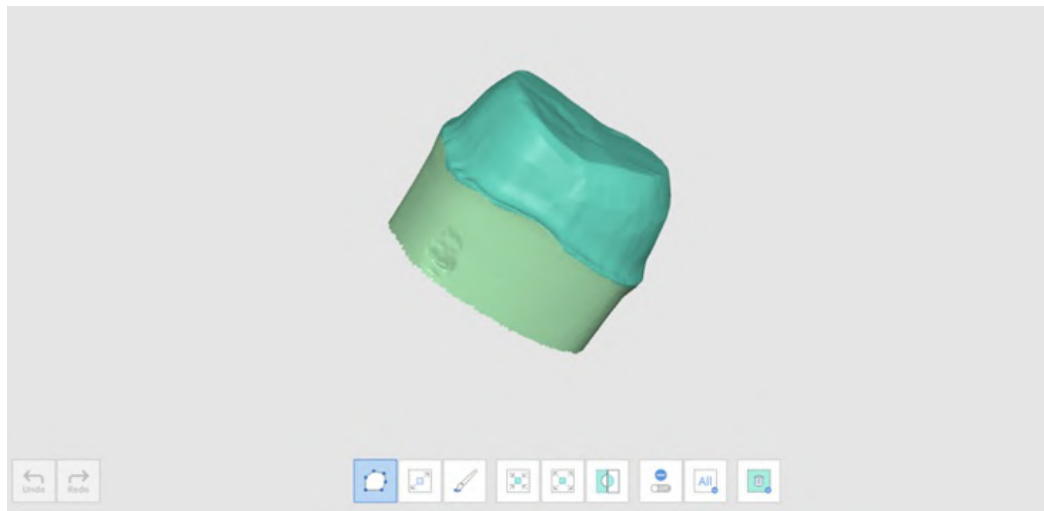

- Verklein het geselecteerde gebied

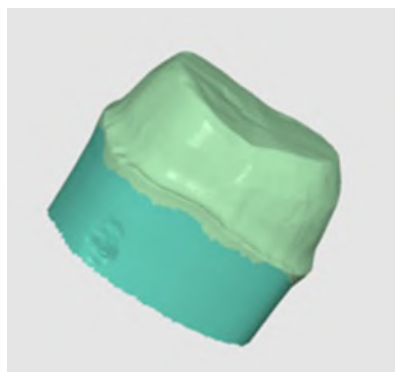


- Vergroot het geselecteerde gebied

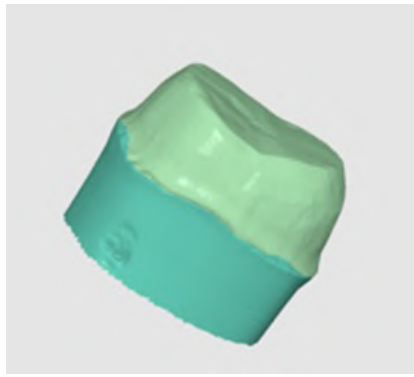







3. U kunt de geselecteerde gebieden deselecteren met het instrument "Geselecteerd gebied wissen".

Optimaliseer occlusie-uitlijning

Optimaliseer de occlusie-uitlijning. U kunt de doelgegevens kiezen en de occlusie-uitlijning aanpassen.

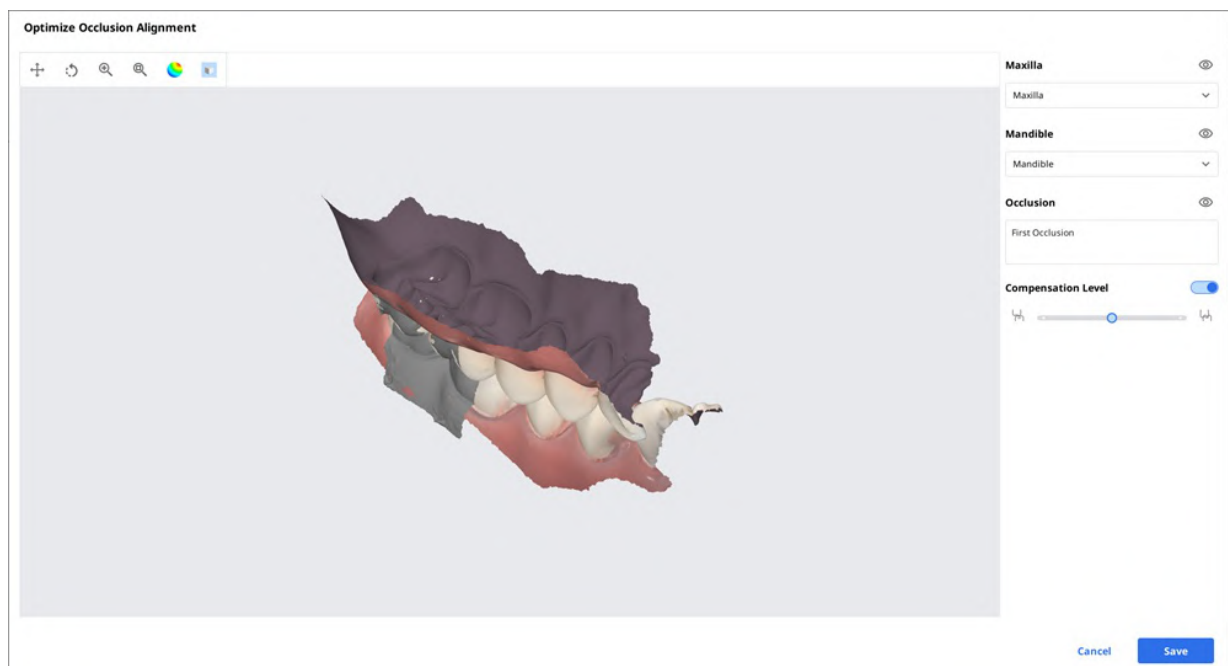


Compensatieniveau

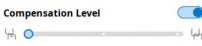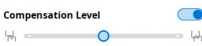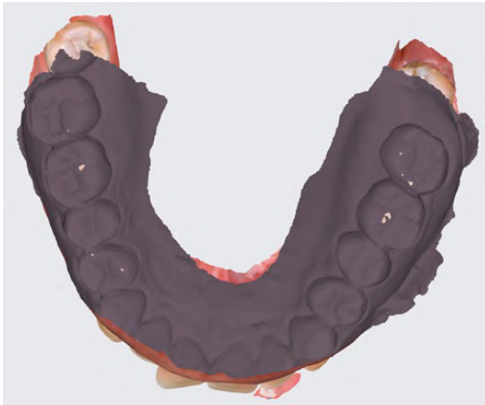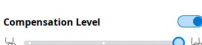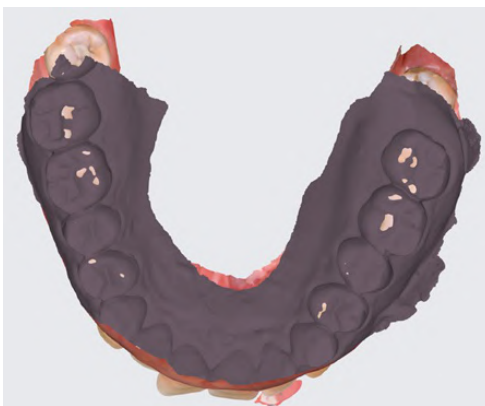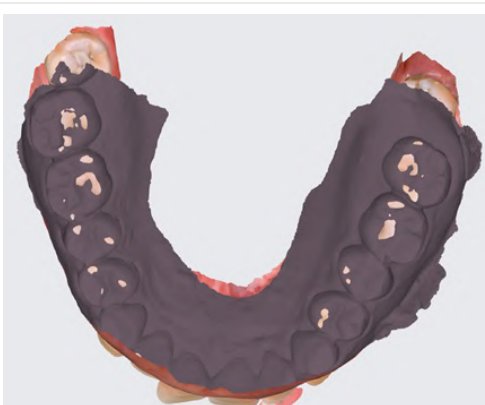Laag	Compensation Level 	
Gemiddeld	Compensation Level 	
Hoog	Compensation Level 	
Uit	Compensation Level 	

Onderkaakbeweging

U kunt de onderkaakbewegingen die zijn opgenomen in Medit Scan for Clinics afspelen om de dynamische occlusale contacten tussen het boven- en ondergebit te zien.

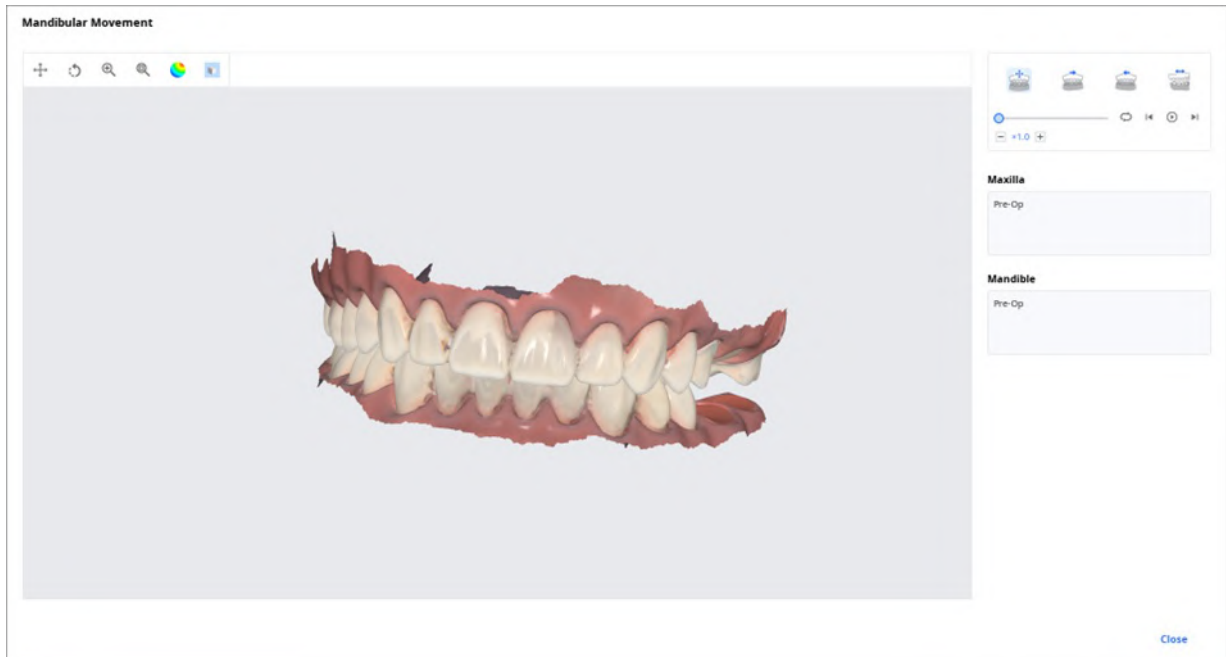

	Vrije beweging	Speel de opname van de vrije onderkaakbeweging af.
	Linker laterale beweging	Speel de opname van de naar links bewegende onderkaak af.
	Rechter laterale beweging	Speel de opname van de naar rechts bewegende onderkaak af.
	Protrusieve beweging	Speel de opname van de voorwaarts bewegende onderkaak af.

Beheer Multi-occlusiegegevens in Bestandenbekijker

U kunt meerdere resultaten van occlusiegegevens krijgen uit de Medit Scan-applicatie.

Medit Link biedt de functie om de resultaten te beheren via de "Bestandenbekijker".

Meerdere resultaten beheren


Wanneer de gebruiker meerdere occlusieresultaten krijgt van Medit Scan for Clinics, biedt Medit Link de mogelijkheid om een resultaat te selecteren.

De lijst met resultaten wordt op naam weergegeven en u kunt één object selecteren.

Het geselecteerde model wordt weergegeven in de "Gegevensboom" en het "Modelweergavegebied".



U kunt de lijst inklappen en het object wijzigen met behulp van de pijlsymbolen.

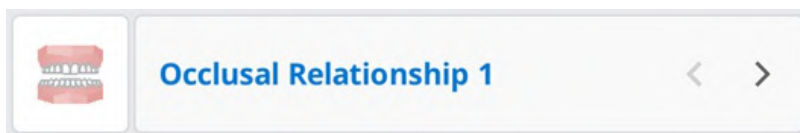

Weergaveopties

U kunt de weergaveopties wijzigen om de opmaak van de dossierlijst in Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box aan te passen.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Statusfilters

Toon of verberg elk filter dat de status van het dossier weergeeft. De verborgen statusfilters worden niet weergegeven op het scherm in Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Met statusfilters kunt u eenvoudig het dossier vinden dat u nodig heeft.

- U kunt op de status klikken die u wilt bekijken om alleen dossiers in die status weer te geven.
- U kunt meerdere statussen tegelijk selecteren.

Voor elke box zijn de volgende filteropties beschikbaar:

Box	Statusfilters
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Tabel items

Selecteer de objecten die moeten worden weergegeven in de dossierlijst in Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. U kunt de volgorde van de tabelitems wijzigen of de kolombreedte van de tabel in de lijstweergave aanpassen om deze optimaal af te stemmen op de gebruikersomgeving.

Voor elke box zijn de volgende tabelitems beschikbaar:

Box	Tabel items
Patient	Patiëntnaam / Patiënt-ID / Geslacht / Aantal dossiers / Registratiedatum / Geboortedatum
Case Box	Status / Dossiernaam / Geboortedatum / Formulierinformatie / Gewijzigd op / Scandatum / Besteldatum / Laboratoriumnaam
Order Box	Status / Dossiernaam / Patiëntnaam / Scandatum / Besteldatum / Laboratoriumnaam / Aangevraagde bezorgdatum / Gewijzigd op
In Box	Status / Besteldatum / Aangevraagde bezorgdatum / Gewijzigd op / Praktijknaam
Work Box	Status / Dossiernaam / Patiëntnaam / Formulierinformatie / Gewijzigd op / Aangevraagde bezorgdatum / Scandatum / Praktijknaam / Besteldatum

Weergavetype

Wijzig het weergavetype tussen galerijweergave en lijstweergave op de Case Box.

Voor elke box zijn de volgende weergavetype-opties beschikbaar:

Box	Weergavetype-opties
Patient	Lijstweergave
Case Box	Lijstweergave / Galerijweergave
Order Box	Lijstweergave
In Box	Lijstweergave
Work Box	Lijstweergave

Groeperen

Selecteer een groeperingsoptie om dossiers in de lijst in te delen en te rangschikken op basis van de geselecteerde optie.

Voor elke box zijn de volgende groeperingsopties beschikbaar:

Box	Groeperingsopties
Case Box	Geen / Patiëntnaam / Scandatum / Besteldatum
Order Box	Geen / Scandatum / Besteldatum / Aangevraagde bezorgdatum
In Box	Geen / Besteldatum / Aangevraagde bezorgdatum
Work Box	Geen / Aangevraagde bezorgdatum

Opmerking

De groeperingsopties zijn niet beschikbaar in Patient, Case Talk en Trash Box.

Sorteren

Selecteer een sorteroptie om de volgorde van de dossiers in de lijst te wijzigen op basis van de geselecteerde optie.

Voor elke box zijn de volgende sorteropties beschikbaar:

Box	Groepering	Sorteeropties
Patient	-	Patiëntnaam / Patiënt-ID / Geboortedatum / Registratiedatum / Aantal dossiers
Case Box	Geen	Patiëntnaam / Gewijzigd op / Scandatum / Besteldatum / Laboratoriumnaam
	Patiëntnaam	Gewijzigd op / Scandatum / Besteldatum / Laboratoriumnaam
	Scandatum	Patiëntnaam / Laatst gewijzigd op / Besteldatum / Laboratoriumnaam
	Besteldatum	Patiëntnaam / Gewijzigd op / Scandatum / Laboratoriumnaam
Order Box	Geen	Patiëntnaam / Scandatum / Besteldatum / Aangevraagde bezorgdatum / Laboratoriumnaam
	Scandatum	Patiëntnaam / Besteldatum / Aangevraagde bezorgdatum / Laboratoriumnaam
	Besteldatum	Patiëntnaam / Scandatum / Aangevraagde bezorgdatum / Laboratoriumnaam
	Aangevraagde bezorgdatum	Patiëntnaam / Scandatum / Besteldatum / Laboratoriumnaam
In Box	Geen	Patiëntnaam / Besteldatum / Aangevraagde bezorgdatum / Praktijknaam
	Besteldatum	Patiëntnaam / Scandatum / Aangevraagde bezorgdatum / Praktijknaam
	Aangevraagde bezorgdatum	Patiëntnaam / Besteldatum / Praktijknaam
Work Box	Geen	Patiëntnaam / Laatst gewijzigd op / Aangevraagde bezorgdatum / Praktijknaam
	Aangevraagde bezorgdatum	Patiëntnaam / Laatst gewijzigd op / Praktijknaam


Opmerking

De sorteeropties zijn niet beschikbaar in Case Talk en Trash Box.

Filteren en zoeken

Op patiënt filteren

Filter en toon dossiers op patiëntnaam. U kunt een lijst maken door alleen de patiënten te filteren waaraan u moet werken.

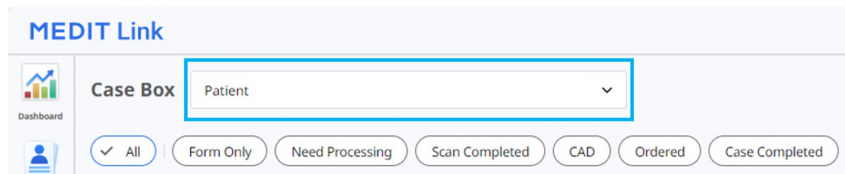


MEDIT Link

Case Box Patient

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. Voer een patiëntnaam in.

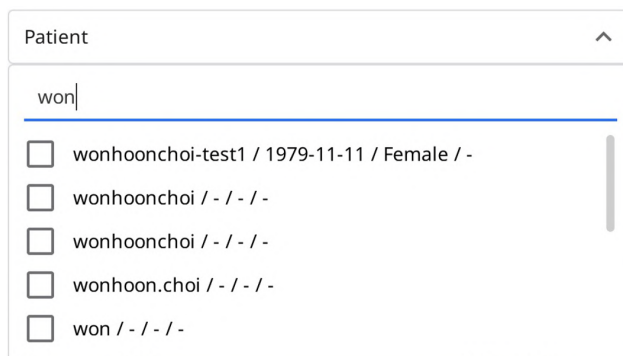


Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Selecteer de patiënten uit de zoekresultaten hieronder.

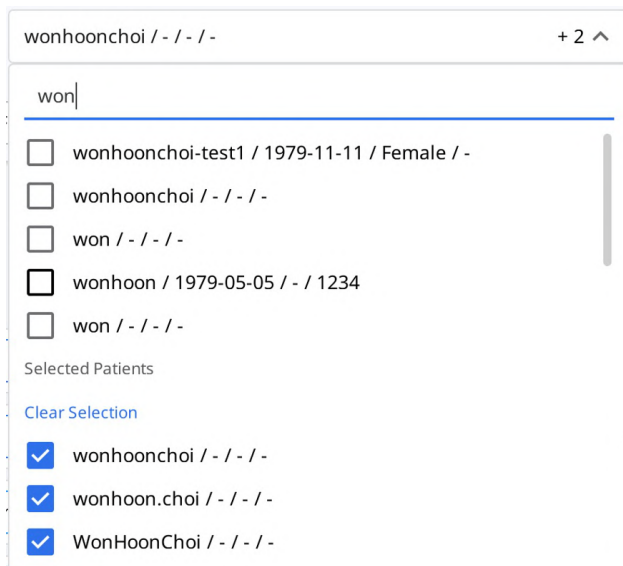

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☒ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. alleen dossiers van de geselecteerde patiënten worden in de lijst weergegeven.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - / - + 2

Total Cases: 20 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오후 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오후 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오후 8:14	2023-02-09 오후 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오후 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오후 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오후 8:13	2023-02-09 오후 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오후 11:27	2023-02-09 오후 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오후 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오후 9:26	2023-02-09 오후 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오후 8:50	2023-02-09 오후 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Op datum filteren

Filter en toon dossiers die het laatst gewijzigd zijn binnen de ingestelde periode.

1. Klik op de periodefilter.

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. Selecteer de duur uit de lijst.

- o Alle: Toont alle dossiers.
- o Aangepast bereik: Geef de begin- en einddatum op om dossiers weer te geven die het laatst zijn gewijzigd binnen de periode.
- o Vandaag: Toont de dossiers die vandaag voor het laatst zijn gewijzigd.
- o Gisteren: Toont de dossiers die gisteren voor het laatst zijn gewijzigd.
- o Afgelopen 7 dagen: Toont de dossiers die in de afgelopen 7 dagen voor het laatst zijn gewijzigd, behalve vandaag.
- o Afgelopen 30 dagen: Toont de dossiers die in de afgelopen 30 dagen voor het laatst zijn gewijzigd, behalve vandaag.
- o Deze maand: Toont de dossiers die in deze maand voor het laatst zijn gewijzigd.
- o Vorige maand: Toont de dossiers die in de afgelopen maand zijn gewijzigd.

De dossierlijst wordt in realtime bijgewerkt met de dossiers die binnen de geselecteerde periode zijn aangemaakt of voor het laatst zijn gewijzigd.

Geavanceerde zoekmogelijkheden

Gebruik de zoekmogelijkheden om snel de gewenste informatie te vinden.

All Search / Contains

De volgende zoekcriteria zijn beschikbaar voor elke box:

Patient	Alle, Patiëntnaam, Patiënt-ID
Case Box	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Patiënt-ID, Formulierinformatie, Laboratoriumnaam
Order Box	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Patiënt-ID, Laboratoriumnaam, Order-ID
In Box	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Klinieknaam, Order-ID
Work Box	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Formulierinformatie, Klinieknaam, Order-ID
Case Talk	Case Talk naam (bevat), Patiëntnaam (gelijk aan)
Trash Box (Clinic)	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Laboratoriumnaam, Wissen op
Trash Box (Lab)	Alle, Dossiernaam, Patiëntnaam, Klinieknaam, Wissen op

U kunt zoekcriteria selecteren en kiezen tussen "Bevat" en "Gelijk aan".

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

Dossier aanmaken/wijzigen/kopiëren/verwijderen

Dossiers aanmaken

Dossiers aanmaken in Case Box (clinic)

1. Klik op "Nieuw dossier" in de rechterbovenhoek.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Register Register & Scan

2. Voer basisinformatie in, zoals de patiëntnaam en de dossiernam.
- Als u een naam invoert die niet op de patiëntenlijst voorkomt, wordt een nieuwe patiënt toegevoegd.
 - Als u een naam invoert die in de patiëntenlijst staat, kunt u deze uit de lijst selecteren.
 - Als u een dossier voor een bestaande patiënt registreert, klikt u op het pictogram "Patiëntenlijst" om een bestaande patiënt te selecteren.



- In het dialoogvenster Patiëntenlijst kunt u een nieuwe patiënt registreren of de gegevens van een bestaande patiënt bewerken.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains

+ New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-09-28	2020-09-28	
☐	test				0	2020-09-28	2020-09-28	
☐	test				13	2020-09-23	2020-09-28	
☒	test				85	2020-09-23	2020-05-08	
☐	Worhoun Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	0000				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. De dossiernamen worden automatisch ingevuld, maar u kunt deze nog wijzigen.
4. Klik op "Registreren en scannen" om de registratie van het dossier te voltooien en te beginnen met scannen.
 - **Registreren:** U wordt doorgestuurd naar de hoofdpagina. Dit is nuttig bij het registreren van meerdere dossiers.
 - **Registreren en scannen:** Ga naar het tabblad Formulier om formulierinformatie voor het dossier in te voeren.

Dossier aanmaken in Work Box (Lab)

1. Klik in de rechterbovenhoek op "Nieuw dossier".

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. Voer de naam van de praktijk in of selecteer deze.
3. Voer de patiëntnaam en de dossiernamen in. De dossiernamen worden automatisch ingevuld, maar u kunt deze nog wijzigen.
4. Voer de verwachte bezorgdatum in, rekening houdend met de datum waarop het werk wordt voltooid.
5. Na registratie van het dossier wordt u doorgestuurd naar de hoofdpagina.

Dossiers bewerken

Dossiers bewerken in Case Box (Clinic)

1. Klik op "Wijzigen" naast de dossiernamen.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion

✔ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibluar movement - Clone - Clone

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Apply

- Klik op "Zoeken" om de patiëntnaam te wijzigen. U kunt dit niet direct bewerken; in plaats daarvan kunt u een patiëntnaam zoeken waarmee u de huidige patiënt wilt vervangen en de informatie van die patiënt in de lijst bewerken.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

- Selecteer de patiëntnaam waarmee u de huidige wilt vervangen.
- Om een nieuwe patiënt aan te maken, drukt u op de knop "Nieuwe patiënt".
- Gebruik de knop "Wijzigen" om de geregistreerde informatie over de patiënt te wijzigen.
- Klik op "Toepassen" om het proces af te ronden.

Dossier bewerken in Work Box (Lab)

- Klik op "Wijzigen" naast de dossiernummer.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

- Klik op "Toepassen" als de bewerking is voltooid.

Opmerking

U kunt de informatie van de dossiers die u via de order in In Box heeft ontvangen niet wijzigen.

Dossiers kopiëren

Dossiers kopiëren in Case Box (Clinic)

- Klik onderaan op het pictogram "Kopiëren".



- U wordt gevraagd welke informatie u naar het nieuwe dossier wilt kopiëren.

Information

 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

- Kies of u alleen formulierinformatie of alle gegevens wilt kopiëren.
- Zodra het kopiëren is voltooid, wordt een dossier aangemaakt met de naam "[Dossiernaam] – Kopiëren".

Dossier kopiëren in Work Box (Lab)

- Klik onderaan op het pictogram "Kopiëren".



- Kopieer alle gegevens om een nieuw dossier aan te maken.
- Zodra het kopiëren is voltooid, wordt een dossier aangemaakt met de naam "[Dossiernaam] – Kopiëren".


Dossier wissen

Dossier wissen (Clinic en Lab)

1. Klik op het "Wissen"-pictogram.



2. Klik op "OK" om het dossier te wissen.

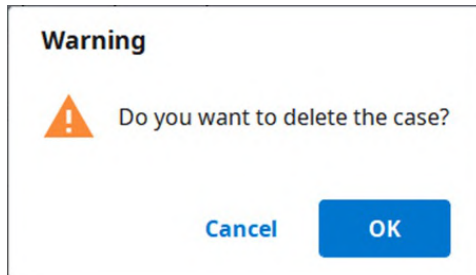

3. Gewiste dossiers worden verplaatst naar de Trash Box en kunnen indien nodig worden hersteld.

Formulierinformatie

Voer de formulierinformatie in op basis van het verbonden programma en het type behandeling.

De informatie die u invoert, wordt gebruikt als basisinformatie voor het werken met scan- of CAD-programma's en het plaatsen van orders.

Formulierinformatie registreren in Case Box

Voer in op het tabblad Formulier

1. Selecteer of u behandelingsinformatie per tand of per boog wilt invoeren.
2. Selecteer Type – Methode – Materiaal – Tint.
 - Als u gegevens verkeerd heeft ingevoerd, kunt u teruggaan om ze opnieuw te selecteren.
 - De geselecteerde informatie wordt automatisch geregistreerd in de orderlijst.
3. Klik op "Opslaan" om uw registratie op te slaan.

Formulierinformatie registreren in Work Box

Voer in op het tabblad Formulier


1. Selecteer het scanprogramma dat u wilt gebruiken.
2. Selecteer een van de volgende opties die uw scanstrategie bepalen: Tandem/Flexibele multi-mal/Multi-mal.
3. De methoden kunnen verschillen afhankelijk van het geselecteerde scanprogramma.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Tanden	O	O
Boog	O	O
Flexibele multi-mal	X	O
Multi-mal	X	O

4. Selecteer tanden, boog of malnummers voor het scanproces.
5. Selecteer Type – Methode – Materiaal – Tint.
 - Als u gegevens verkeerd heeft ingevoerd, kunt u teruggaan om ze opnieuw te selecteren.
 - De geselecteerde informatie wordt automatisch geregistreerd op de lijst.
6. Klik op "Opslaan" om uw registratie op te slaan.

Tanden verbinden tot brug

U kunt meerdere tanden tot een brug verbinden wanneer hetzelfde materiaal op meerdere aangrenzende tanden wordt aangebracht. Klik op het brugpictogram naast de geselecteerde tanden om ze te verbinden of te scheiden.

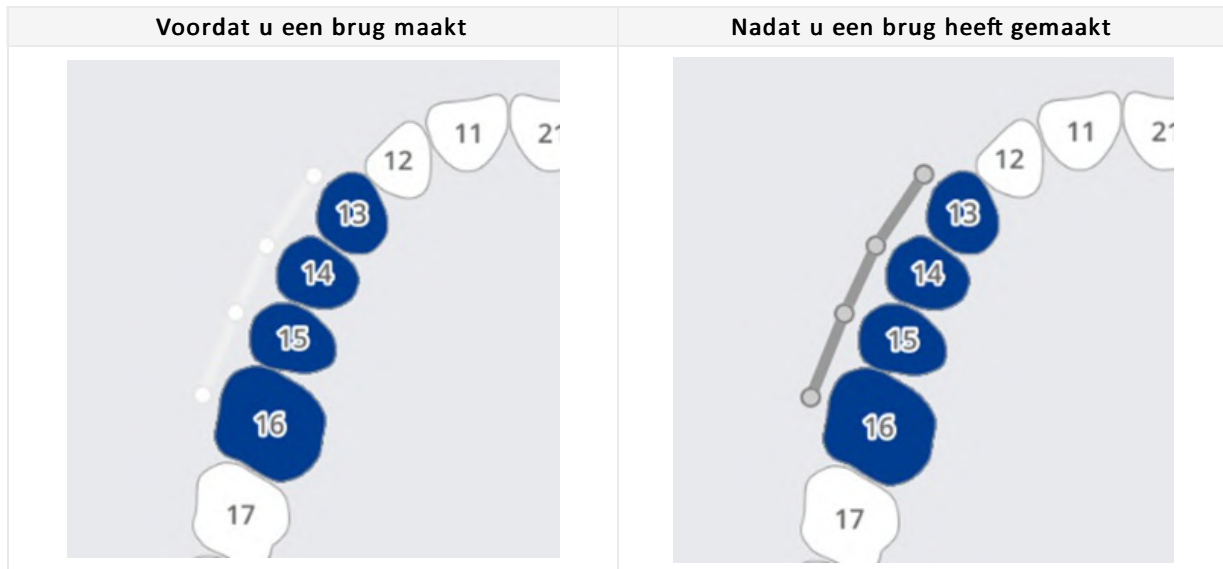

Scanopties instellen

Afhankelijk van het programma waarmee u werkt, worden verschillende scanopties geboden.

De geselecteerde scanopties worden doorgegeven aan elk scanprogramma.

Medit Scan for Labs

Algemene opties

	Aangrenzende tanden	Markeer de voorbereide en aangrenzende tanden en geef deze informatie door aan het scanprogramma.
	Antagonist	Markeer automatisch de antagonisten en geef deze informatie door aan het scanprogramma.
	Articulator	Geef opties weer voor het selecteren van de articulator in het scanprogramma.
	Bewegingsmarkering	Sta het gebruik van de scanstrategie "Kaakbeweging" in het scanprogramma toe.

Opties per tand

	Scanlichaam	Sta het instellen van een strategie toe voor het scannen van scanlichamen in het scanprogramma.
	Pre-operatie scan	Sta het instellen van een strategie toe voor het scannen van een pre-operatie model in het scanprogramma.
	Wasmodel scan	Sta het instellen van een strategie toe voor het scannen van wax-ups in het scanprogramma.

Aan favorieten toevoegen

U kunt snel een product selecteren door het als favoriet op te slaan.

De lijst met opgeslagen favorieten wordt beheerd als een sjabloon en kan worden gedeeld via de export- en importfuncties.

Aan favorieten toevoegen

1. Selecteer het tandnummer.
2. Selecteer Type – Methode – Materiaal – Tint.
 - Type – Methode – Materiaal – Tinten kunnen als favoriet worden opgeslagen, zelfs als ze niet allemaal zijn geselecteerd.
3. Klik op het "Ster"-pictogram.

4. Een combinatie van de geselecteerde parameters, met uitzondering van het tandnummer, staat op uw favorietenlijst.

Favoriete sjablonen beheren

U kunt verschillende soorten sjablonen opslaan, beheren en delen.

Toevoegen	Voeg een nieuw sjabloon toe.
Hernoemen	Hernoem het huidige sjabloon.
Wissen	Wis het huidige sjabloon.
Exporteren	Exporteer het huidige sjabloon naar een bestand.
Importeren	Importeer een sjabloonbestand.

Werken aan scannen/CAD

Scanproces

Op basis van de ingevoerde informatie gaat u verder met scannen.

1. Voer behandelingsinformatie in/ sla deze op en selecteer de nodige scanopties.
2. Klik op de knop "Scannen" in de rechterbovenhoek van het venster.

CAD-proces

Medit Link biedt de DentalCAD integratie-app om Medit Link met DentalCAD te verbinden.

1. Installeer de DentalCAD Integration app in de App Box.
2. Ga naar de dossierdetails en klik op het pictogram van de DentalCAD Integration app in de Quick Launcher.
3. Geef in het pop-up dialoogvenster het pad op naar de DentalCAD app die op uw pc is geïnstalleerd.
4. Voer de dossierdetails van het gescande dossier in en klik op het pictogram van de DentalCAD Integration app, waarmee een dialoogvenster verschijnt om een dentalProject bestand aan te maken.
5. Voer formulierinformatie voor DentalCAD in en klik op "Openen" om het CAD-programma te openen.
6. Wanneer u de DentalDB Integration app installeert, worden de CAD-resultaten automatisch opgeslagen op het door u aangegeven opslagpad in exocad. (Alleen laboratoriumaccounts)


Add-in apps gebruiken

Invoegtoepassing Quick Launcher

U kunt verschillende add-in apps direct uitvoeren door op de geïnstalleerde app-pictogrammen in de Quick Launcher te klikken. U kunt de volgorde van app-pictogrammen wijzigen door ze te verslepen.



App launcher beheer

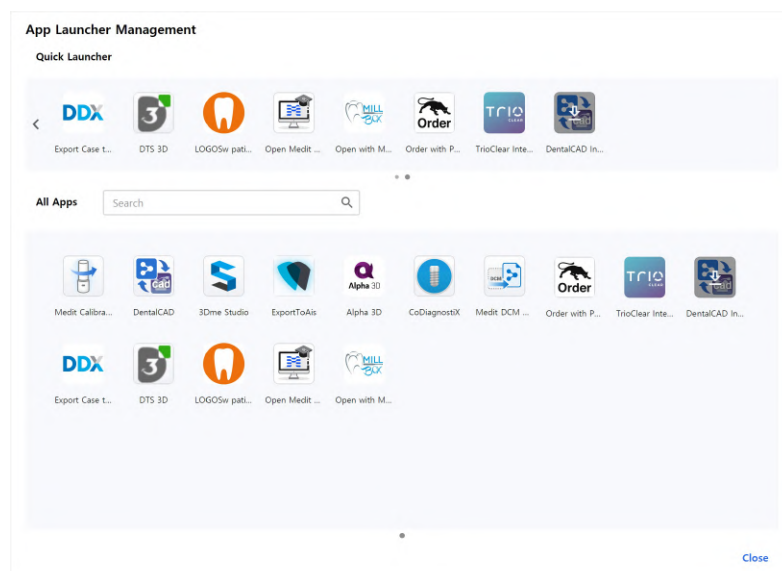

Quick Launcher

U kunt bepalen welke apps in de Quick Launcher worden weergegeven. U kunt de volgorde van app-pictogrammen wijzigen door ze te verslepen, of u kunt mappen maken om gelijksoortige apps te groeperen en ze op die manier te ordenen.

Alle apps

Alle door u geïnstalleerde apps worden weergegeven. U kunt met de rechtermuisknop op een app-pictogram klikken om de app toe te voegen aan de Quick Launcher. Vanuit het contextmenu van de rechtermuisknop kunt u ook kiezen om de app te openen, te installeren of te verwijderen.

Resultaatbestanden krijgen

Bestanden met scanresultaten exporteren

Naast het delen van resultaten met partners via bestellingen, biedt Medit Link ook de mogelijkheid om uw resultaatbestanden op te slaan in het gewenste bestandsformaat door gebruik te maken van de exportfunctie.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Image Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close

Export


Exporteer bestanden naar	Geef het pad op waar u de resultaatbestanden wilt opslaan.
Mapnaam	Het systeem creëert een nieuwe map en slaat alle resultaatbestanden daarin op. De standaard mapnaam wordt ingesteld aan de hand van de naamgevingsregel. U kunt ook zelf de mapnaam wijzigen. Dit kunt u doen in Instellingen > Export opties > Regels voor mapnaam.
Bestandsnaam	Stel de bestandsnaam voor het resultaat in. De naamgevingsregel bepaalt de standaard bestandsnaam. U kunt ook zelf de bestandsnaam wijzigen. Dit kunt u doen in Instellingen > Export opties > Regels voor bestandsnaam
Type	Selecteer het ontwerpprogramma dat u wilt gebruiken. Medit Link past de bestanden automatisch aan op basis van uw keuze, waardoor u verder kunt gaan met het ontwerp zonder extra asuitlijning nodig te hebben.
Meshformaat	Geef het formaat van het mesh-bestand aan.
Afbeeldingsformaat	Geeft het formaat aan van de geëxporteerde afbeeldingsbestanden.
Bestanden comprimeren	Comprimeer alle resultaten tot één bestand.
Individuele mesh samenvoegen	Combineer het resultaat van de bovenkaak of onderkaak met de individuele tand. Het is nuttig wanneer het importeren van meerdere bestanden in een programma niet mogelijk is.
Exporteer alle occlusale relaties	Wanneer meerdere occlusale resultaten vanuit de scan-app worden gegenereerd, kunt u alle occlusale resultaten in één keer exporteren.
Sla de dossierinformatie op als PDF	Sla de dossierinformatie op als een PDF met het resultaat.

Resultaatbestanden exporteren vanuit de dossierlijst

U heeft de mogelijkheid resultaatbestanden van een enkel dossier of van meerdere dossiers tegelijkertijd te exporteren met de optie "Exporteren" boven de dossierlijst in de Case Box en Work Box.

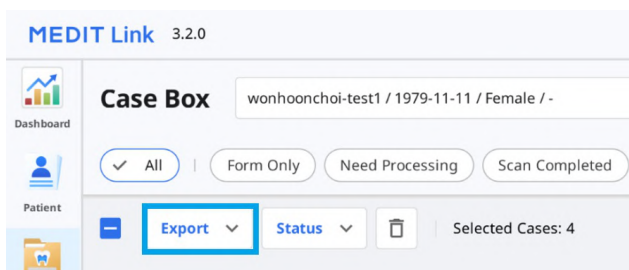

1. Ga naar Case Box of Work Box.
2. Selecteer alle dossiers waarvan u resultaatbestanden wilt exporteren uit de lijst.

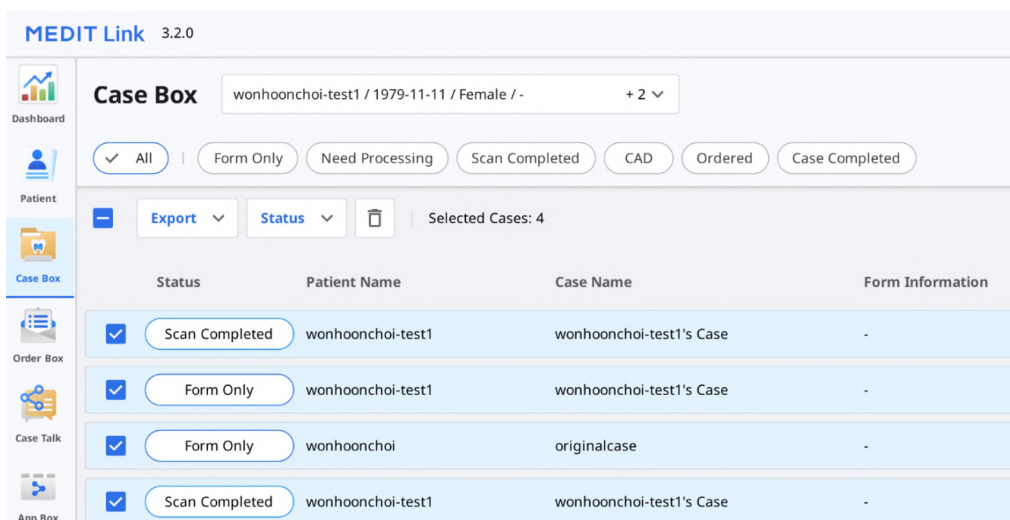

3. Klik op "Exporteren" en selecteer "Resultaatbestanden".

Export

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

- Stel de doelmap, het bestandstype, het meshformaat en het afbeeldingsformaat in en selecteer export opties op het tabblad "Opties".

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

Opmerking

De velden "Mapnaam" en "Bestandsnaam" kunnen niet worden bewerkt bij het exporteren van bestanden voor meerdere dossiers.

De mapnaam en bestandsnaam worden automatisch aangemaakt aan de hand van de regels die u hebt ingesteld voor de opties "Regel voor mapnaam" en "Regel voor bestandsnaam" in Instellingen > Export opties.

- Klik op "Exporteren".
- Klik op "Ja" om de map waarin de bestanden worden opgeslagen te openen.

Question

?


Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Resultaatbestanden exporteren vanuit Bestandenbekijker

Om bestanden met scanresultaten voor een dossier te exporteren, gebruikt u het pictogram "Exporteren" in de rechterbovenhoek van het tabblad "Bestandenbekijker".

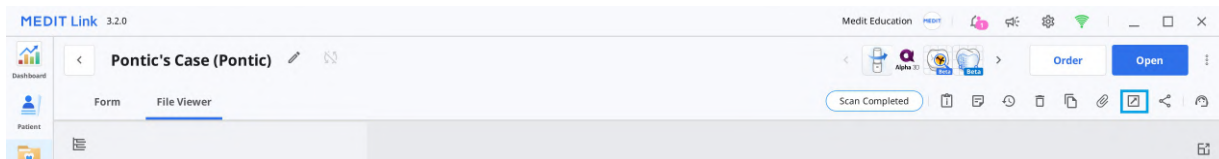

1. Ga naar Case Box of Work Box.
2. Klik om een dossier uit de lijst te openen.
3. Klik op het pictogram "Exporteren" in de rechterbovenhoek van het tabblad "Bestandenbekijker".



4. Stel de doelmap, de mapnaam, de bestandsnaam, het bestandstype, het meshformaat en het afbeeldingsformaat in en selecteer export opties op het tabblad "Opties".

Export files in case

OptionsFile List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh


☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close

Export

5. In het tabblad "Bestandslijst" kunt u de benodigde bestanden voor het dossier selecteren door overbodige bestanden te deselecteren.

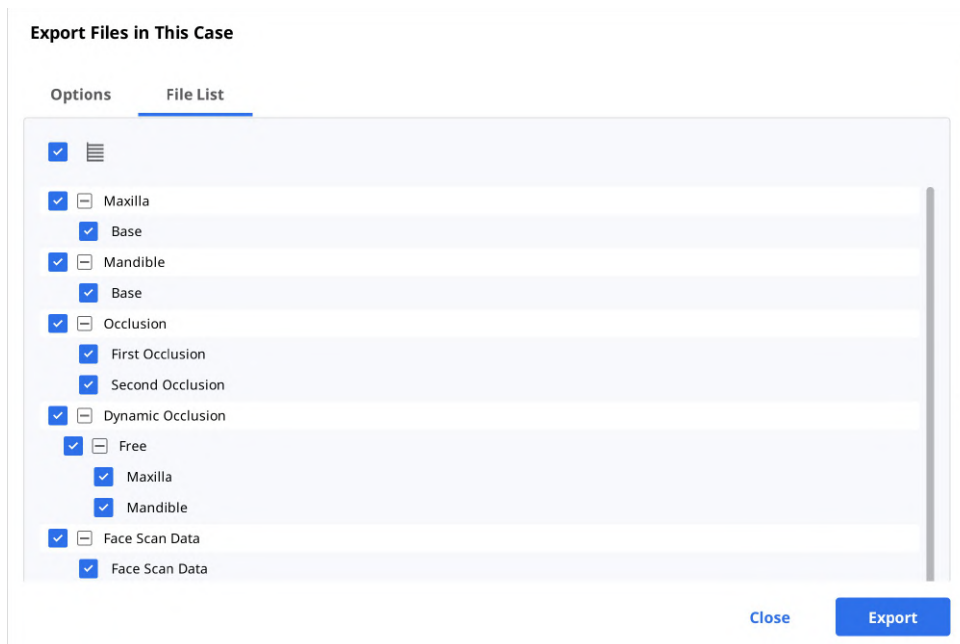


6. Klik op "Exporteren".
7. Klik op "Ja" om de map waarin de bestanden worden opgeslagen te openen.

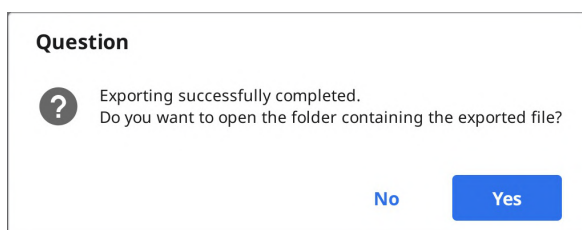


Resultaatbestanden exporteren vanuit de Gegevensboom

U kunt een bestand of bestanden in een specifieke gegevensgroep exporteren vanuit het uitgeklapte menu in de bestandenbekijker.

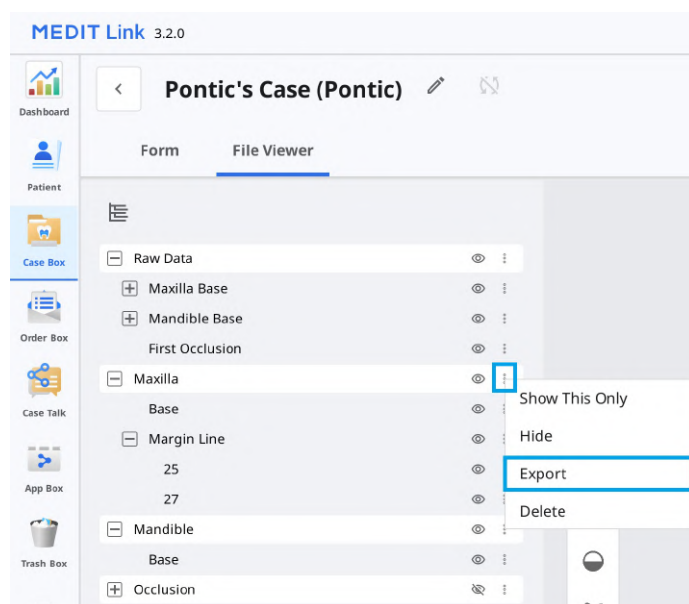

1. Ga naar Case Box of Work Box.
2. Klik om een dossier uit de lijst te openen.
3. Klik op het pictogram met de drie puntjes naast de gegevensgroep of een object in de gegevensboom op het tabblad "Bestandenbekijker".

4. Klik vervolgens op "Exporteren".

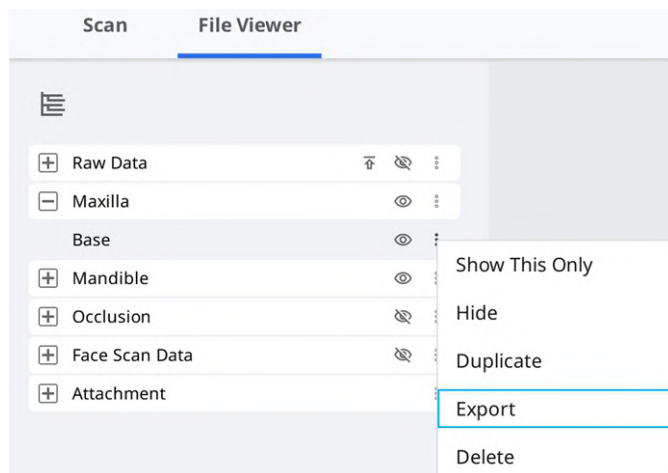

5. Stel de doelmap, de mapnaam, de bestandsnaam, het bestandstype, het meshformaat en het afbeeldingsformaat in en selecteer export opties op het tabblad "Opties".

The 'Export files in case' dialog box is shown with the 'Options' tab selected. The 'Export Files To' field contains the path 'C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/'. The 'Folder Name' field contains 'Multi Occlusion - Scan - Before Scanning'. The 'File Name' field also contains 'Multi Occlusion - Scan - Before Scanning'. The 'CAD Type' dropdown is set to 'Maestro'. Under 'Mesh Format', the 'Convert mesh files to the below formats' section has checkboxes for 'meditMesh', 'OBJ', 'PLY' (checked), and 'STL'. Below this, the 'Do not convert the attached files' checkbox is also checked. Under 'Image Format', the 'Convert images to the below format' checkbox is unchecked, and the 'Image Format' section has radio buttons for 'JPG', 'JPEG', 'PNG' (selected), and 'BMP'. At the bottom, there are checkboxes for 'Compress Files', 'Combine Individual Mesh', 'Export All Occlusal Relationship', and 'Save Case Information as PDF' (with a 'Preview' link). The 'Close' and 'Export' buttons are at the bottom right.

6. U ziet dat alleen de bestanden die u in de gegevensboom hebt gekozen, geselecteerd zijn in de Bestandslijst.

Export Files in This Case

Options **File List**

- ☐ Maxilla
 - ☐ Base
- ☒ Mandible
 - ☒ Base
- ☐ Occlusion
 - ☐ First Occlusion
 - ☐ Second Occlusion
- ☐ Dynamic Occlusion
- ☐ Free
 - ☐ Maxilla
 - ☐ Mandible
- ☐ Face Scan Data
 - ☐ Face Scan Data

Close **Export**

7. Klik op "Exporteren".
8. Klik op "Ja" om de map waarin de bestanden worden opgeslagen te openen.

Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No **Yes**

Dossierlijst exporteren als CSV

Medit Link biedt de optie om de dossierlijst in CSV-formaat te exporteren.

U kunt de dossierlijst met basisinformatie exporteren en dossiers eenvoudig beheren.

1. Ga naar Case Box, Order Box, In Box, of Work Box.
2. Selecteer de dossiers die u wilt exporteren.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female f- +2

Export Status Selected Cases: 4

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
☒ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-19 오전 11:00			
☒ Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:15			
☒ Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
☒ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-	2023-10-05 오전 8:10	2023-08-18 오전 9:00		

3. Klik op "Exporteren" en kies "Dossierlijst (zoals weergegeven)" of "Dossierlijst (met alle items)".

Export Status

Result Files

- ☒ Case List (as shown)
- ☐ Case List (with all items)

Opmerking

Dossierlijst (zoals weergegeven): Exporteer de dossierlijst met de momenteel weergegeven items op het scherm. Ga naar Weergaveopties > Tabel items om de items naar wens te tonen of te verbergen. Dossierlijst (met alle items): Exporteer de dossierlijst met alle items, inclusief Status, Dossiernaam, Geboortedatum, Formulierinformatie, Gewijzigd op, Scandatum, Besteldatum en Laboratoriumnaam.

4. Stel het pad en de bestandsnaam in en sla de lijst op.
5. De dossierlijst wordt opgeslagen als een CSV-bestand.


Marginale lijn exporteren

Medit Scan for Clinics biedt een functie om de marginale lijn te maken en Medit Link kan de marginale lijn naar het CAD-programma overbrengen.

Exporteer marginale lijn als kleur

Over het algemeen converteert Medit Link de marginale lijn als kleur en exporteert het resultaat samen met de bovenkaak of onderkaak. U kunt de marginale lijn in hun cad maken met verwijzing naar de kleurinformatie.

Voorbeeld:

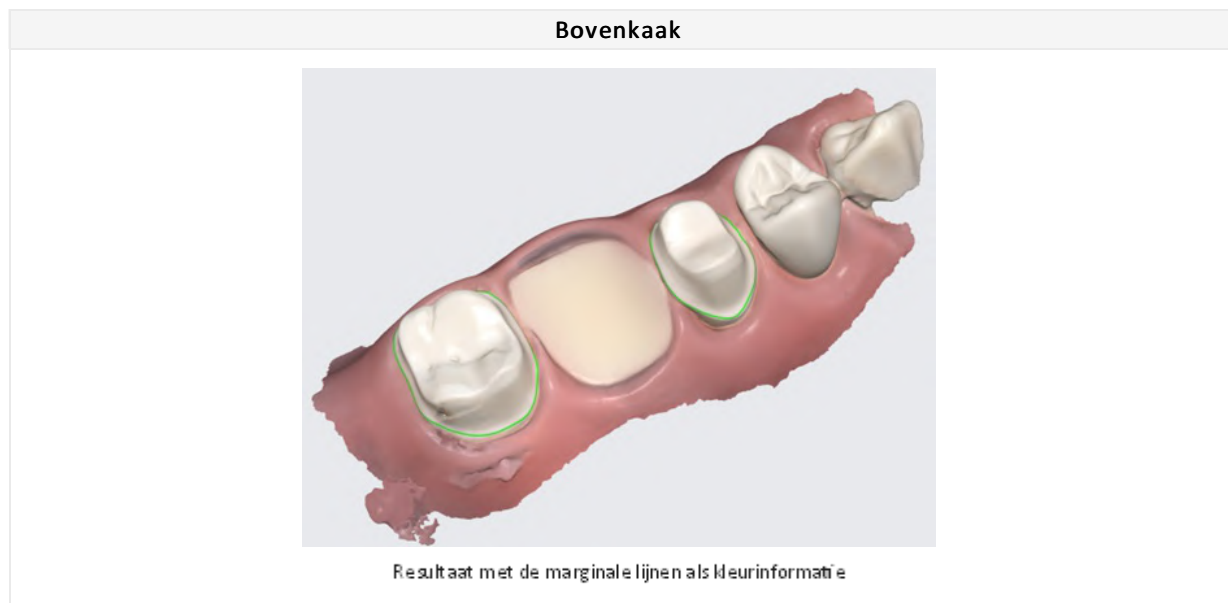

Opmerking

Deze functie is beschikbaar voor formaten die kleurinformatie bevatten, zoals meditMesh, OBJ en PLY. De marginale lijn kan niet worden omgezet in STL.

Opmerking


Type > 3Shape ondersteunt deze functie niet.

Exporteer marginale lijn als bestand

In het geval van Exocad exporteert Medit Link de marginale lijn naar "~margin.xyz" die rechtstreeks in exocad kan worden geïmporteerd.

U kunt dit bestand zonder extra werk in exocad gebruiken.

Voorbeeld:

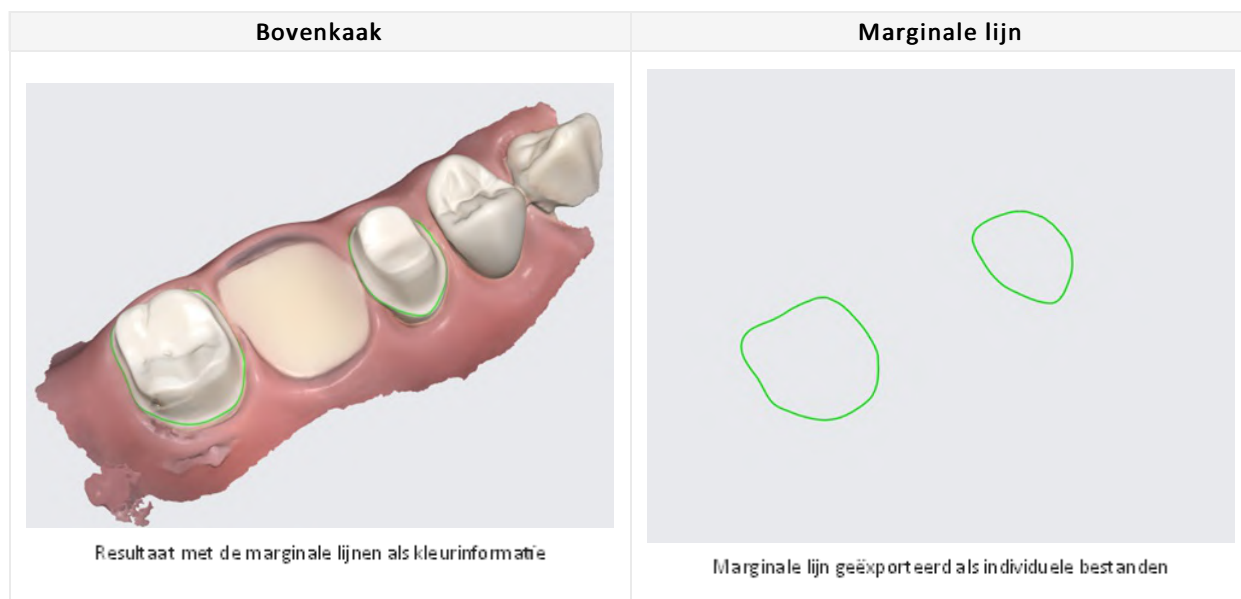

Bestanden van Medit Link Web downloaden

Medit Link biedt een downloadfunctie.

Als u de resultaatbestanden wilt ontvangen zonder de Medit Link-applicatie te installeren, kunt u de bestanden downloaden via de Medit Link-webservice.

Opmerking


De gegevens moeten worden geüpload op de Medit Cloud om de bestanden van het web te downloaden.

De downloadfunctie is beschikbaar in het volgende menu van de Medit Link-webservice.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

De "Download"-knop bevindt zich rechtsboven.

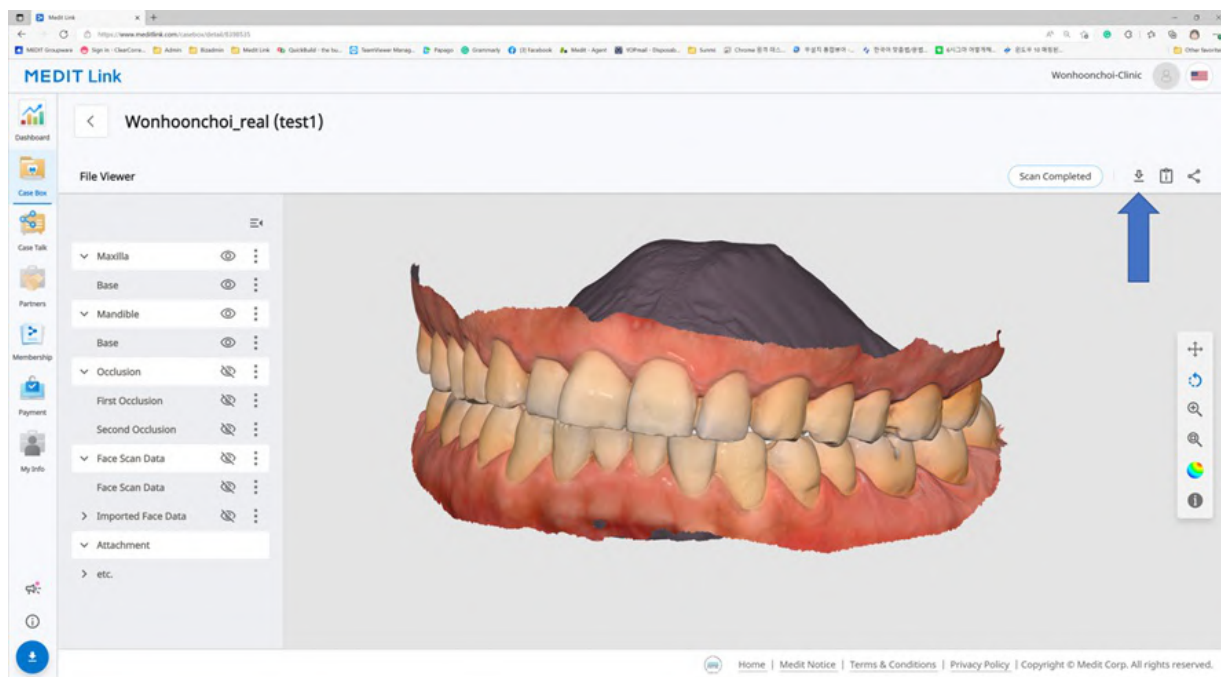


Web Viewer

Wanneer u het dossier deelt via Case Talk, kunt u instellen of u downloaden toestaat of niet.

Als u "Downloadtoestemming verlenen" aanvinkt en het dossier deelt, kunnen alle gebruikers die verbinding maken met de gedeelde link de bestanden downloaden.

The screenshot shows the 'Share through Case Talk' dialog box. It has a title bar with a question mark icon. The main content area includes a 'Share with Anyone' dropdown menu, a 'Create a shared link and share it with anyone.' instruction, an 'Expiration Date' field set to '2022-04-27', and a 'PIN Code' section with a checkbox for 'PIN Code' and an 'Enter PIN Code' input field. Below these are three checked options: 'Share the patient's name', 'Grant Download Permission Premium Feature' (highlighted with a blue box), and 'Allow comments'. Each option has a brief description. At the bottom, there is a 'Comment' text area and a character count '0/1024'. A disclaimer at the very bottom states that by pressing the 'Get Link' button, the user agrees to the collection and sharing of personal information. The dialog box has 'Close' and 'Get Link' buttons at the bottom right.


In de Web Viewer vindt u rechtsboven het pictogram "Downloaden".

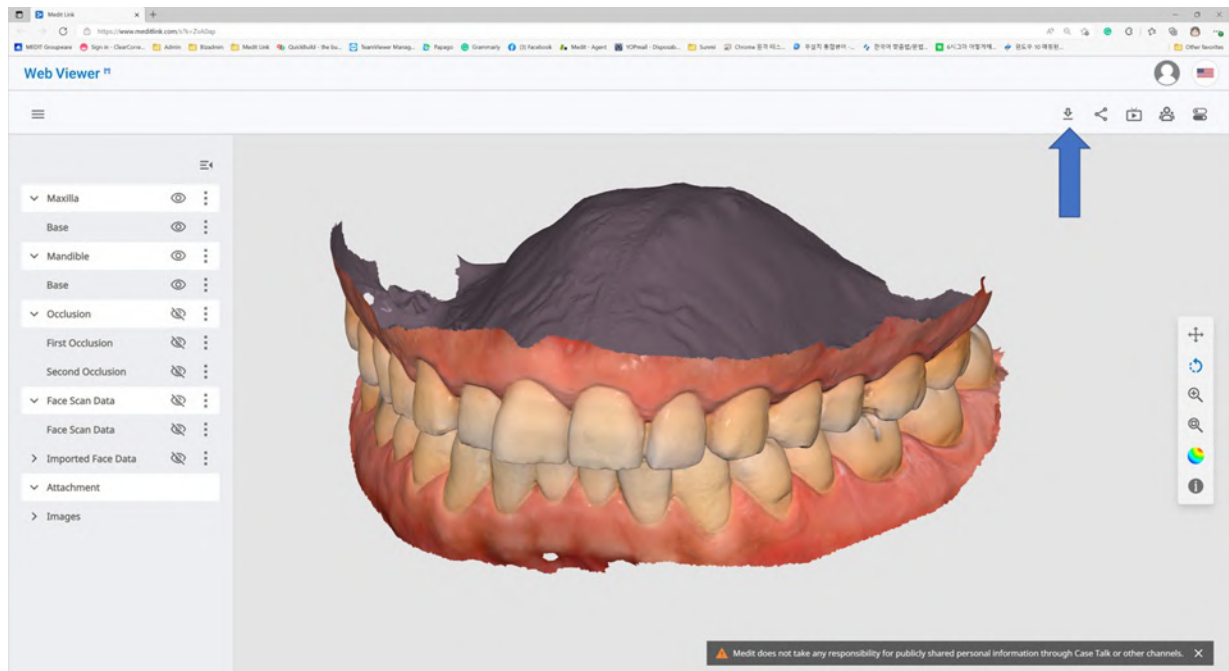

1. Klik op "Downloaden".



2. Selecteer het meshformaat in het downloaddialogvenster.

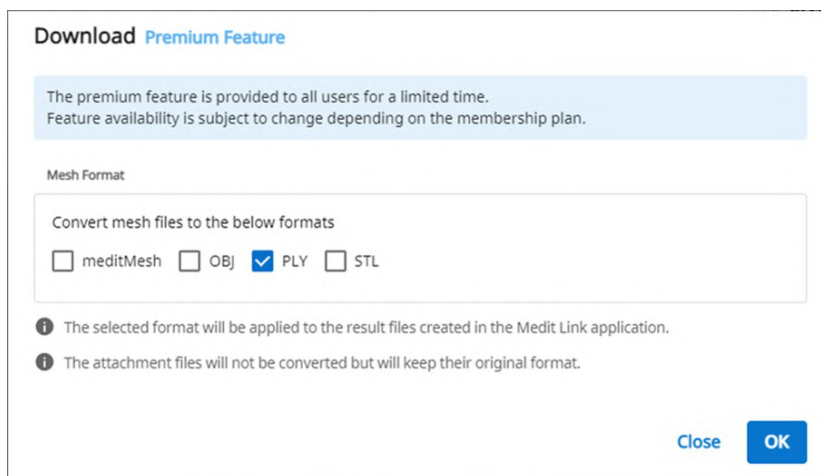

3. Klik vervolgens op "OK".

Dossiers bestellen/beheren

U kunt eenvoudig een dossier bestellen met gegevens die zijn verkregen uit gekoppelde programma's en die door de gebruiker zijn bijgevoegd.

Dossiers bestellen

U kunt een order plaatsen voor uw partners in Case Box.

1. Klik op de "Order"-knop.
2. Controleer de informatie die nodig is voor uw order.

The screenshot shows the 'Order' form with the following fields and options:

- Order** (Section Header)
- General** (Selected Tab), **Order List**, **File List**
- Partner**: WonhoonChoi_Lab_Stage
- Partner Information**: WonhoonChoi_Lab_Stage, Seoul, KR, [02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea, 01026088546
- Case Name**: mandibluar movement - Clone - Clone
- Patient Name**: Test Occlusion
- ☒ **Share patient information**
- Requested Delivery Date**: 2023-04-13
- Delivery Time**: 8:15 (AM/PM selector)
- Memo**: (Empty text area)
- Tags**: You can add the entered tag with Enter or Spacebar.
- ☒ **Include all occlusion relationships in the order**
- ☒ **Include Tags In The Order**
- Buttons**: Cancel, OK

3. Selecteer een partner.
4. Controleer de productinformatie in het tabblad "Orderlijst"
 - U kunt beslissen of u de naam van de patiënt wilt delen.
5. Kies de te bestellen bestanden in het tabblad "Bestandslijst"
6. Voer uw gewenste bezorgdatum in.
 - De standaardwaarde is ingesteld op 7 dagen na de orderdatum.
7. U kunt notities en tags toevoegen voor uw partner om specifieke details te vermelden.
8. Wanneer meerdere occlusale resultaten uit de scan-app worden gegenereerd, kunt u alle occlusale resultaten in één keer verzenden door "Alle occlusale relaties bestellen" aan te vinken.
9. Ga verder met uw order.

Order bevestigen (In Box)

- Accepteer de order bij ontvangst.
- Geaccepteerde orders worden doorgestuurd naar de Work Box.

Order annuleren (Order Box)

- U kunt een order annuleren voordat uw partner deze accepteert.
- Geannuleerde dossiers kunnen opnieuw worden besteld.

Order afwijzen (In Box)

- U kunt een ontvangen order afwijzen.
- Afgewezen dossiers kunnen opnieuw worden besteld.

Bestelde dossiers controleren

U kunt de details van het dossier dat u in de Order Box heeft besteld controleren in het clinic-account. U kunt ook het dossier controleren dat u van het In Box in het lab-account heeft ontvangen.

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

Order info	De volgende informatie kan in de order worden opgenomen: order-ID/patiëntnaam/accountnaam/scandatum/orderdatum/uiterlijke bezorgdatum/memo. U kunt de details van het bestelde product en de bezorginformatie bekijken.
Orderlijst	De orderlijst toont de details van het bestelde product.
Verzending	Voer de verzendinformatie in/controleer deze.

Verzendinformatie invoeren (In Box)

Voer de verzendinformatie van het voltooide dossier in en begin met de verzending.

1. Klik op het tabblad "Verzending".
2. Voer de verzendinformatie in en klik op "Registreren".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. De ingevoerde informatie wordt naar uw partner gestuurd.

Bezorgdatum beheren

U kunt de verwachte bezorgdatum instellen wanneer u een order plaatst. Deze informatie wordt doorgegeven aan uw partner.

De aangevraagde bezorgdatum instellen (Clinic-account)

- Wanneer u uit de Case Box bestelt, kunt u de gewenste bezorgdatum invoeren.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

Delivery Time

2023-04-13

오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

• You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

- De standaardwaarde is 7 dagen na de besteldatum.
- Voer de datum/tijd in waarop u de producten wilt ontvangen en ga verder met bestellen.
- U kunt de tijd eenvoudig instellen met behulp van de schuifbalk.

De verwachte bezorgdatum instellen (Laboratorium-account)

- U kunt de verwachte bezorgdatum voor het bij In Box bestelde dossier invoeren.

The screenshot shows the MEDIT Link 3.0.0 interface. The main form is for 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic'. It includes fields for Order ID (10413603), Patient Name (test), Partner Name (Wonhoonchoi-Clinic), Scanning Date (2022-09-29 7:56), Order Date (2022-09-29 8:13), Requested Delivery Date (2022-10-01 10:30), and Expected Delivery Date (2022-10-01 10:30). The Expected Delivery Date field is highlighted with a blue box and a pencil icon. The Order List table on the right shows three items:

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

1. Controleer de aangevraagde bezorgdatum bij de partner en wijzig de planning met de knop "Wijzigen".



2. Voer de verwachte bezorgdatum in, rekening houdend met de datum waarop het werk wordt voltooid. Indien nodig kunt u ook een opmerking achterlaten.
3. Klik op "Toepassen".

The screenshot shows a date selection interface. It includes a calendar for March 2022 with the 17th selected. Below the calendar is a 'Delivery Time' slider set to 11:45 AM and a 'Comment' text area. The 'Apply' button is highlighted.

4. De verwachte bezorgdatum en de notitie worden samen met de order verzonden.
 - U kunt de datum en notities bekijken in de Order Box.
 - U kunt de verwachte bezorgdatum wijzigen, waarna de wijzigingen worden doorgegeven aan uw partner.
5. Met de "Geschiedenis"-knop kunt u de geschiedenis van het dossier bekijken.



Dossier voltooien

Voltooien (Work Box/In Box)


Zodra alle taken zijn uitgevoerd, klikt u op "Gereed" om het dossier af te ronden.

Voltooi een dossier vanuit de dossierdetails

U vindt het pictogram met de drie puntjes rechts van de knop "Openen" of "Opnieuw scannen".



Voltooi het werk door op het pictogram te klikken en "Done" te selecteren.

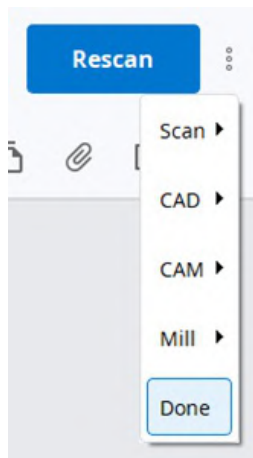

Voltooi meerdere dossiers vanuit de dossierlijst

1. Ga naar Work Box.
2. Selecteer alle dossiers om te voltooien.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard
In Box
Work Box
Case Talk
App Box
Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export Status Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
✓ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
✓ Form Only	test's Case	test	-
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. Klik op "Status" en selecteer "Done".

Voltoeien (Case Box/Order Box)

Nadat het dossier in het laboratorium is voltooid, moet de praktijk het dossier bevestigen om het bestelproces te voltooien.

De praktijk kan de knop "Ontvangst bevestigen" in de Order Box vinden zodra het laboratorium het werk heeft afgerond.


Als u hierop klikt, wordt het hele orderproces voltooid en wordt de status van het dossier gewijzigd in "Case Completed".

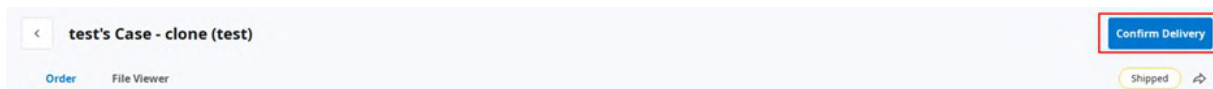

Voltooi een niet-besteld dossier in de Case Box

Voor dossiers die niet naar het lab zijn besteld, kunt u deze dossiers voltooien vanuit de Case Box.

1. Ga naar de Case Box.
2. Selecteer het dossier dat u wilt voltooien.

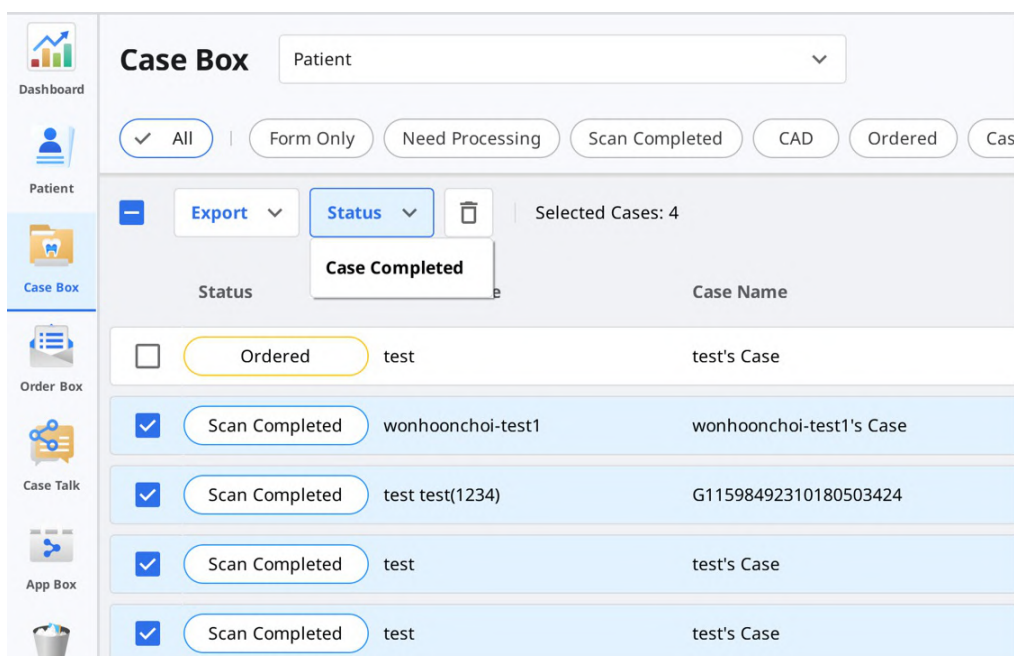

3. Klik op "Status" en selecteer "Case Completed".

Communiceren met behulp van tags

U kunt extra informatie aan uw dossier toevoegen door gebruik te maken van tags en deze delen met uw partners.

Voeg tags toe bij het aanmaken van een nieuw dossier

U kunt tags invoeren wanneer u een nieuw dossier aanmaakt of dossierinformatie bewerkt.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

U kunt de tags die u eerder hebt gebruikt gemakkelijk opzoeken en selecteren.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

*Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.*

Tag

t

t (new)

Suggestions

- tet
- tagtest
- tag
- tat2

Voeg tags toe bij het bestellen

U kunt tijdens het bestellen tags controleren en bewerken in het ordervenster.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 8:15 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Controleer tags voor dossierdetails

MEDIT Link 3.2.0

wonhoon choi

Order Open

Scan Completed

Occlusal Relationship 1

Memo Edit

Tags Cancel Save

Dr_Name x Worker_Name x

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

+Z