

USER GUIDE

Medit Link (Revision 9) 2024.04



Table of Contents

Medit Link

7	مقدمة
7	Medit Link
7	نظرة عامة على الخدمة
8	الخدمات السحابية
8	منصة إدارة سير العمل مع نظام الطلب

Medit Link < التثبيت

9	متطلبات النظام
9	متطلبات النظام لـ Windows
9	متطلبات النظام لـ macOS
9	متطلبات النظام لخدمة الويب
9	الموصى به للمتصفحات
9	الحد الأدنى للأجهزة المحمولة
10	التثبيت على Windows
13	التثبيت على macOS

Medit Link < بدء الاستخدام

17	إنشاء حساب وتسجيل الدخول
17	موقع Medit Link
17	إنشاء حساب
19	تسجيل الدخول وصفحة الترحيب

Medit Link < موقع Medit Link

21	Dashboard
21	نظرة عامة على الـ Dashboard
21	Medit Insights
	الاشتراك في Medit
22	Insights
	إلغاء الاشتراك في Medit
23	Insights
24	Patient
24	البحث عن المرضى
25	Case Box/Work Box
25	فلتر الحالات
25	فلتر حسب المريض
26	الفلتر حسب الحالة
27	الفلتر حسب المدة
27	الفلتر حسب البحث
27	تفاصيل الحالة
29	Order Box/In Box
29	تفاصيل الطلب
	علامات التبويب في Order
29	Box/In Box
30	Case Talk
30	إنشاء Case Talk
31	تحديد نوع إذن المشاركة وخيارات المشاركة
32	تفاصيل Case Talk

33	Web Viewer
34	التعليق
35	التعليقات
36	مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي
36	شجرة البيانات
36	التحكم بشجرة البيانات
36	ضوابط النموذج ثلاثي الأبعاد
38	Partners
38	البحث عن شركاء
38	قائمة شركائي
39	دعوة شركاء
40	Membership
40	عضوية
40	خطة الاشتراك
41	التخزين السحابي
41	الاشتراك
43	إلغاء الاشتراك
44	معلومات الفواتير
44	كيفية إضافة طريقة دفع
45	كيفية تغيير طريقة الدفع
46	الاسترداد
46	تسجيل رمز الاسترداد
47	تفعيل رمز الاسترداد
48	My Info
48	حسابي
48	عيادتي/مختبري (حساب المشرف فقط)
49	الماسح الضوئي الخاص بي
50	قوائم أخرى
50	الإخطارات & التحديثات
50	مواقع ذات صلة
50	تنزيل تطبيق Medit Link

Medit Link < تطبيق Medit Link

52	نظرة عامة
52	يلخص الجدول أدناه القوائم المتوفرة في كل نوع من حسابات العيادات والمختبرات.
53	شريط العنوان
53	My Information
53	الإشعارات
54	الإخطارات & التحديثات
54	الإعدادات
55	حالة الشبكة
57	الإعدادات
57	عام
58	إدارة التخزين
58	الفترة المحددة
58	التخزين المحلي
58	التخزين السحابي
59	تحديد البرنامج المُتَّصِل
59	خيارات التصدير
61	أداة تحويل الحالة
61	تصدير الحالة
62	إستيراد حالة
64	خيارات الوكيل

64	حول
64	دليل المستخدم
66	القائمة
66	Dashboard
66	Patient
67	إضافة مريض جديد
67	حذف مريض
67	دمج مرضى
68	Case Box/Work Box
68	علامات التبويب في Case Box/Work Box
68	الوظائف في Case Box/Work Box
69	Order Box/In Box
70	علامات التبويب في Order Box/In Box
70	Case Talk
71	App Box
71	الكل
71	Medit Apps
72	تم تنزيلها
72	Trash Box
72	مدير مزامنة الحالات
73	التحميل
73	التنزيل
74	مواقع ذات صلة
75	عارض الملفات
75	شجرة البيانات
75	أدوات التحكم في النموذج
75	التحكم في النموذج ثلاثي الأبعاد
76	التحكم بالصور ثنائية الأبعاد
77	أدوات الوظائف
77	التقاط الصور والمذكرة
77	Ortho Capture
78	ملء الثقوب
78	القص
81	تحسين محاذاة الإطباق
82	حركة الفك السفلي
83	إدارة بيانات الإطباق المتعدد في عارض الملفات
83	كيفية إدارة نتائج متعددة
85	خيارات العرض
85	فلتر الحالة
86	نوع العرض
86	التجميع
86	الفرز
88	الفلتر والبحث
88	فلتر حسب المريض
89	الفلتر حسب التاريخ
89	إمكانات البحث المتقدم
	Medit Link < سير العمل
91	إنشاء / تعديل / استنساخ / حذف الحالات
91	إنشاء حالات

91	إنشاء حالات في Case Box (العيادة)
92	إنشاء حالات في Work Box (المختبر)
92	تعديل الحالات
92	تعديل الحالات في Case Box (العيادة)
93	تعديل الحالة في Work Box (المختبر)
94	استنساخ الحالات
94	استنساخ حالة في Case Box (العيادة)
94	استنساخ حالة في Work Box (المختبر)
95	حذف حالة
95	حذف حالة (العيادة والمختبر)
96	معلومات التسجيل
96	تسجيل معلومات التسجيل في Case Box
96	الإدخال في تبويب النموذج
96	تسجيل معلومات التسجيل في Work Box
96	الإدخال في تبويب النموذج
96	توصيل الأسنان بجسر
97	ضبط خيارات المسح
97	Medit Scan for Labs
97	خيارات عامة
97	خيارات بالأسنان
97	الإضافة إلى المفضلات
97	الإضافة إلى المفضلات
98	إدارة القوالب المفضلة
99	العمل على المسح/CAD
99	عملية المسح
99	عملية CAD
99	الاستفادة من التطبيقات الإضافية
99	مُضاف المشغل السريع
99	إدارة مشغل التطبيقات
100	المشغل السريع
100	كل التطبيقات
101	الحصول على ملفات النتائج
101	تصدير ملفات نتائج المسح
102	تصدير ملفات النتائج من قائمة الحالات
103	تصدير ملفات النتائج من عارض الملفات
105	تصدير ملفات النتائج من شجرة البيانات
107	تصدير قائمة الحالات كملف CSV
107	تصدير خط الإنهاء
107	تصدير خط الإنهاء كلون
108	تصدير خط الإنهاء كملف
108	تنزيل ملفات من موقع Medit Link
109	Case Box/Work Box
109	Web Viewer
112	طلب/إدارة الطلبات
112	طلب حالات
112	تأكيد الطلب (In Box)
113	إلغاء الطلب (Order Box)
113	رفض طلب (In Box)
113	التحقق من الحالات المطلوبة
113	إدخال معلومات الشحن (In Box)
114	إدارة تاريخ التسليم
114	تحديد تاريخ التسليم المطلوب (حساب العيادة)
114	تحديد تاريخ التسليم المتوقع (حساب المختبر)

115	إكمال الحالة
	الإكمال (Work)
116	(Box/In Box)
116	أكمل حالة من تفاصيل الحالة
116	أكمل الحالات المتعددة من قائمة الحالات
	الإكمال (Case)
116	(Box/Order Box)
117	أكمل حالة غير مطلوبة في Case Box
118	التواصل باستخدام العلامات
118	إضافة علامات عند إنشاء حالة جديدة
119	إضافة علامات عند الطلب
119	تحقق من العلامات في تفاصيل الحالة

مقدمة

Medit Link

Medit Link هي أداة تعاونية مصممة لتسهيل التواصل بين العيادات والمختبرات لتوفير سير عمل محسن لكل الأطراف.

يقدم ميزات متباينة بناءً على نوع وأدوات كل حساب. يوفر البرنامج واجهة مستخدم سهلة الاستخدام لإدارة سير العمل، من المسح الضوئي باستخدام الماسحات الضوئية الفموية والتمودجية، إلى طلب الحالات، إلى تصميم التركيبات وإنتاجها.

يتكون Medit Link من خدمة ويب وتطبيق كمبيوتر.

نظرة عامة على الخدمة

التطبيق	الموقع		
- إدخال معلومات النموذج - المسح الضوئي - إدارة الطلبات - الربط بالـ CAD - إدارة المرضى	- تسجيل وإدارة الحساب - البحث عن وإدارة الشركاء - مشاركة الحالات عبر Web Viewer برابط قابل للمشاركة - فتح حالات منشأة على التطبيق - إدارة الطلبات		
أدخل معلومات النموذج، قم بالمسح الضوئي، قدّم طلبات، وقم بإدارة المرضى. - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box	قم بالبحث وإدارة الشركاء والعيادات الخاصة بك، ومشاركة الحالات. - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - Partners - Membership - My Info	المشرف	العيادة
- Patient - Case Box - Case Talk - Order Box - App Box - Trash Box	- Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - My Info	Member	
أدخل معلومات النموذج، قم بالمسح الضوئي، وقم بإدارة الطلبات. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box	ابحث وقم بإدارة الشركاء ومختبرك، وشارك الحالات. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Partners - Membership - My Info	المشرف	المختبر
- In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box	- In Box - Work Box - Case Talk - My Info	Member	

الخدمات السحابية

يدعم Medit Link التحميل/التنزيل التلقائي لقواعد البيانات والملفات من خلال AWS (Amazon Web Services).

تتم مزامنة البيانات المخزنة في السحابة تلقائيًا مع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمستخدمين متعددين في المنظمة حتى يتمكنوا من الوصول إلى نفس البيانات من أي جهاز كمبيوتر في أي وقت. تعمل ميزة النسخ الاحتياطي والاسترداد المستندة إلى السحابة على الحفاظ على أمان جميع بياناتك. إنها تحافظ على بياناتك آمنة حتى في حالة فقد البيانات بسبب فشل الكمبيوتر المفاجئ.

تتيح الخدمة السحابية لأطباء الأسنان والمختبرات المشاركة مشاركة البيانات بسرعة دون متاعب إرسال بريد إلكتروني أو نقل عمليات المسح يدويًا. يتم تشفير جميع البيانات، بما في ذلك معلومات المريض، وتخزينها ونقلها بشكل آمن. يتوافق Medit مع القوانين واللوائح الطبية مثل HIPAA و GDPR.

منصة إدارة سير العمل مع نظام الطلب

يقدم Medit Link نظام الطلب الخاص به.

- يتيح Medit Link للمستخدمين إقامة شركات بين أطباء الأسنان ومختبرات الأسنان ومشاركة البيانات بسرعة وسهولة.
- يمكنك التحقق من حالة الطلب وإدارتها.

متطلبات النظام

ملحوظة

يرجى الرجوع إلى متطلبات النظام لـ Medit Scan for Clinics و Medit Scan for Labs إذا كنت ترغب في استخدام برنامج المسح مع الماسح الضوئي الخاص بك.

متطلبات النظام لـ Windows

حاسوب محمول & كمبيوتر سطح المكتب	
Intel Core i5 2.6 GHz أو أعلى	CPU
16 GB أو أعلى	RAM
NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) أو أحدث / أو بطاقة فيديو AMD مكافئة	الرسومات
Windows 10 64 Bit (غير متوفر في Bit 32) أو أعلى	OS

متطلبات النظام لـ macOS

Mac	
M1 مع 8-Neural Engine، 16-core GPU، 7-core	المعالج
16 GB أو أعلى	RAM
Monterey 12 أو أحدث	نظام التشغيل

متطلبات النظام لخدمة الويب

الموصى به للمتصفحات

المتصفحات	
(Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium	الكمبيوتر
Chrome, Firefox	Android
Safari, Chrome, Firefox	macOS


الحد الأدنى للأجهزة المحمولة

iOS	Android	
ما يعادل iPhone 7 أو أعلى	ما يعادل Galaxy S7 أو أعلى	الجهاز
iOS 11.0	Android 7.1 Nougat	نظام التشغيل
2 GB أو أعلى	3 GB أو أعلى	RAM
A10 Fusion	أعلى من Snapdragon 710	AP


التثبيت على Windows

يتم تثبيت Medit Link كحزمة مع برامج اكتساب المسح - Medit Scan for Clinics و Medit Scan for Labs.


1. قم بتشغيل Medit_LinkSetup.exe.
2. حدد لغة للتثبيت.
3. حدد المجلد لتثبيت Medit Link. يرجى قراءة شروط وأحكام الترخيص والموافقة عليها والنقر على "تثبيت".

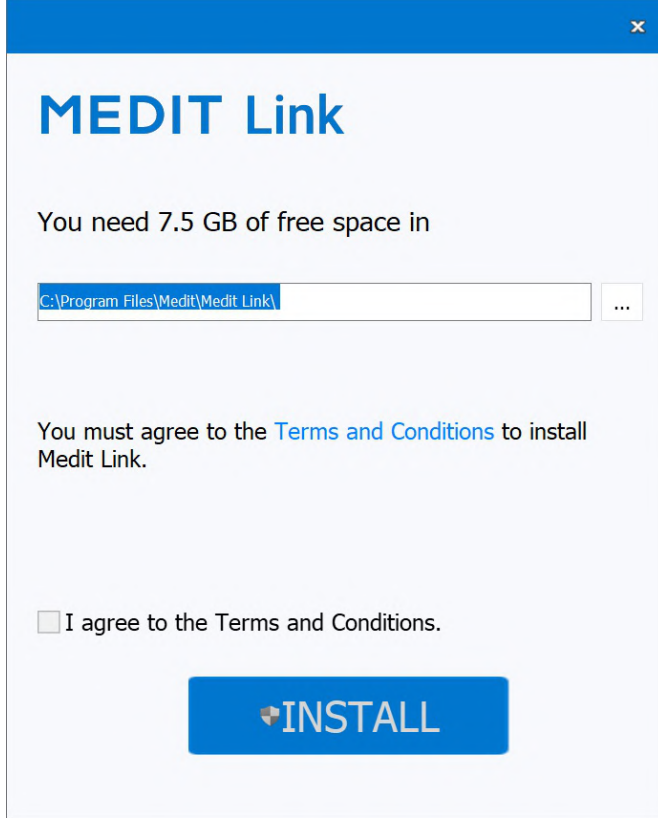

4. تأكد من فصل كبل الماسح الضوئي عن الكمبيوتر قبل الانتقال إلى الخطوة التالية. قد لا يبدأ التثبيت إذا كان الماسح متصلاً بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
5. سيتم تثبيت البرنامج تلقائيًا وقد يستغرق بضع دقائق. لا تقم بإيقاف تشغيل أو فصل جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل أن يكتمل التثبيت.

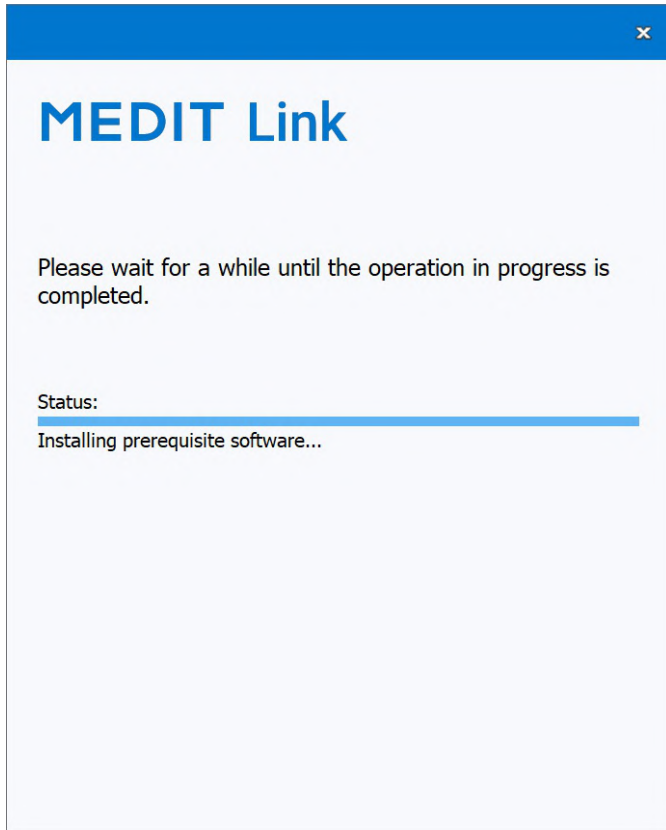

6. يرجى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد اكتمال التثبيت. يمكنك المتابعة بدون إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر إذا لم يكن لديك الماسح الضوئي.

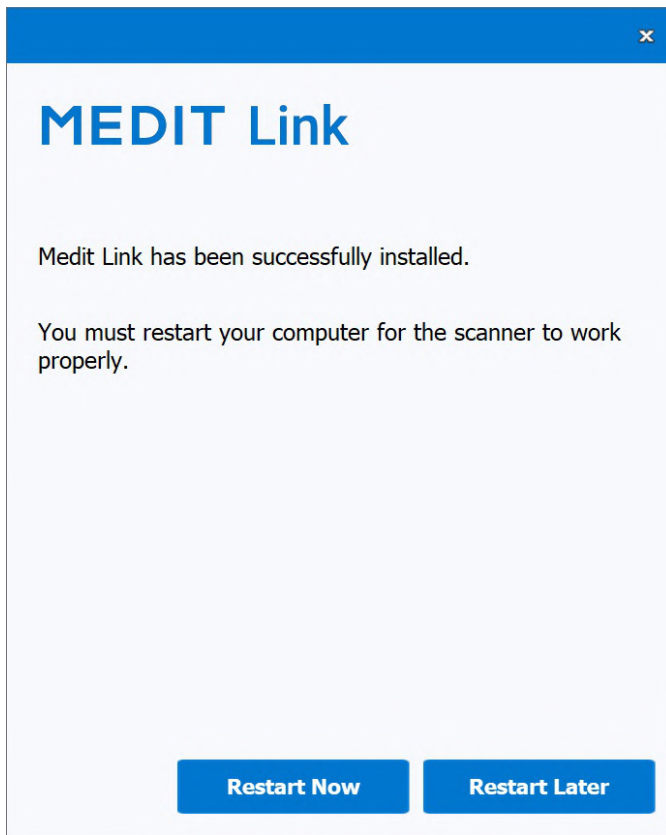


ملحوظة

إذا لم تقم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد اكتمال التثبيت، فقد لا يعمل الماسح الضوئي بشكل صحيح.


التثبيت على macOS

يتم تثبيت Medit Link كحزمة مع Medit Scan for Clinics.


1. قم بتشغيل Medit_Link_x.x.x.pkg وانقر على "متابعة".

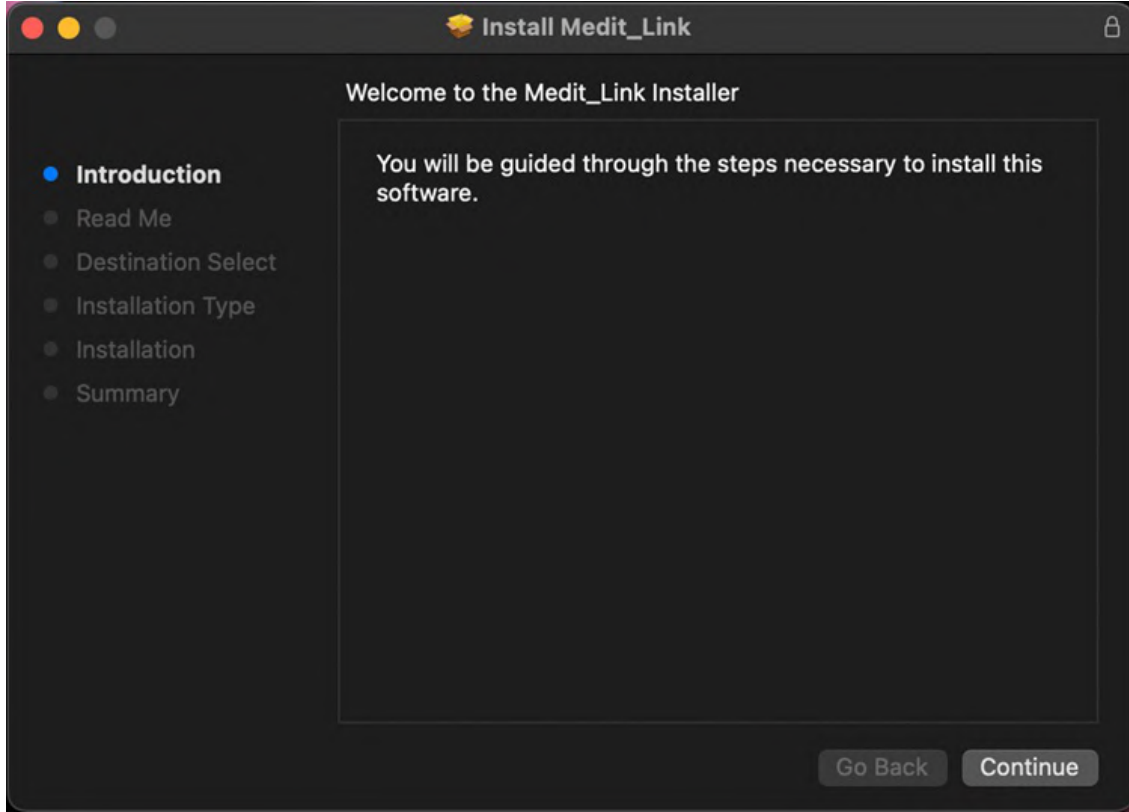


2. اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وانقر على "متابعة".

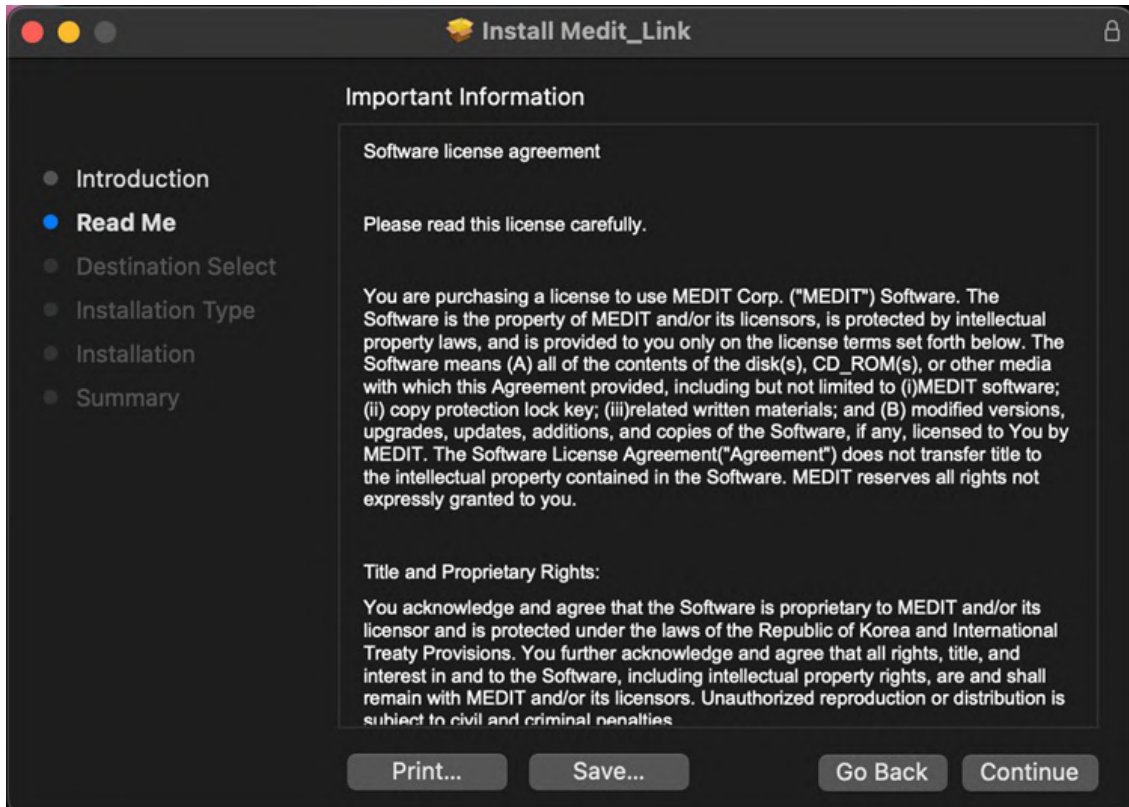

3. حدد القرص المراد تثبيته وانقر على "متابعة".

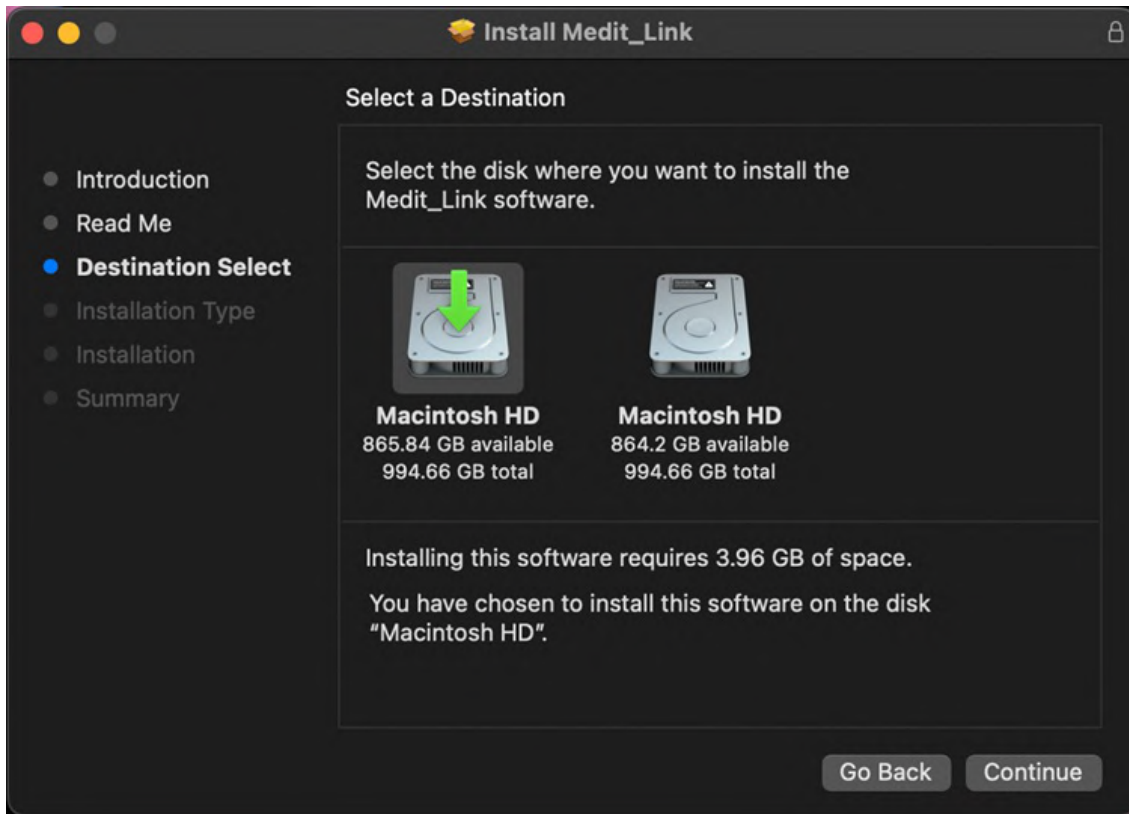


4. انقر على "تغيير موقع التثبيت..." لتغيير وجهة التثبيت.

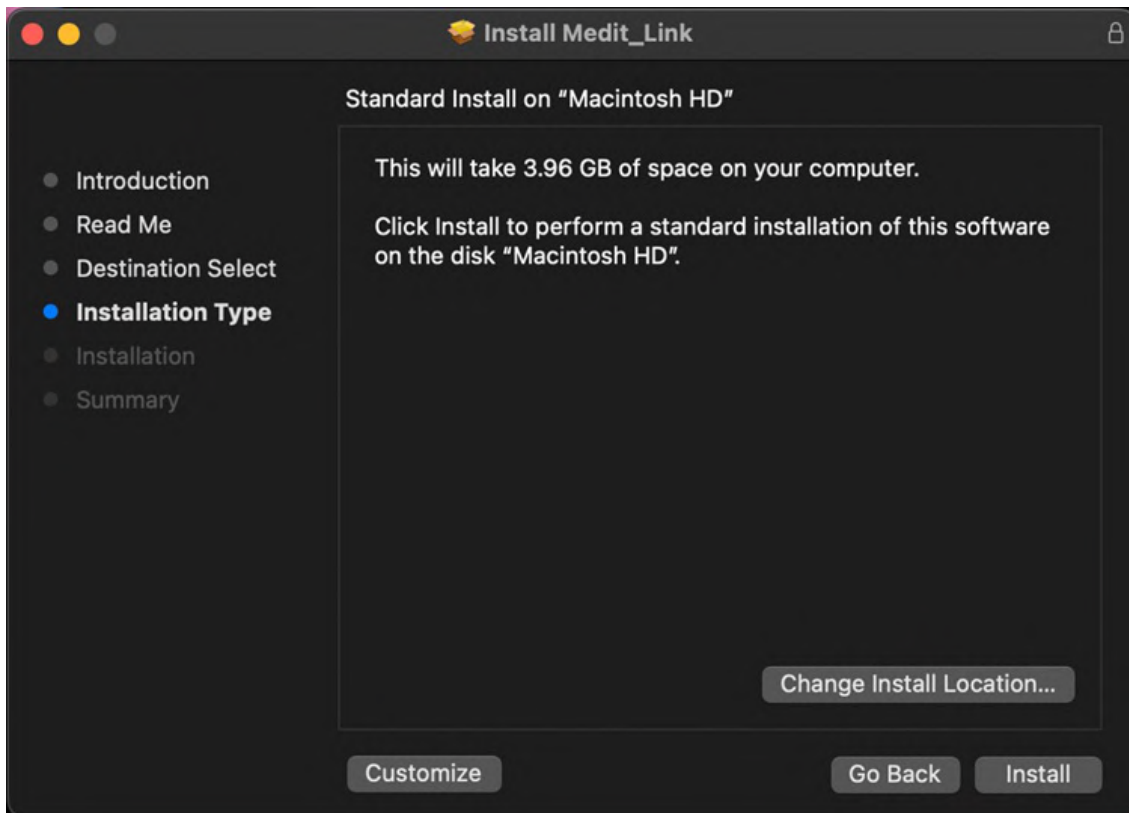


5. انقر على "تثبيت" واكتب كلمة مرور الMac للسماح بالتثبيت إذا طُلب منك ذلك.



6. انتظر حتى اكتمال التثبيت.

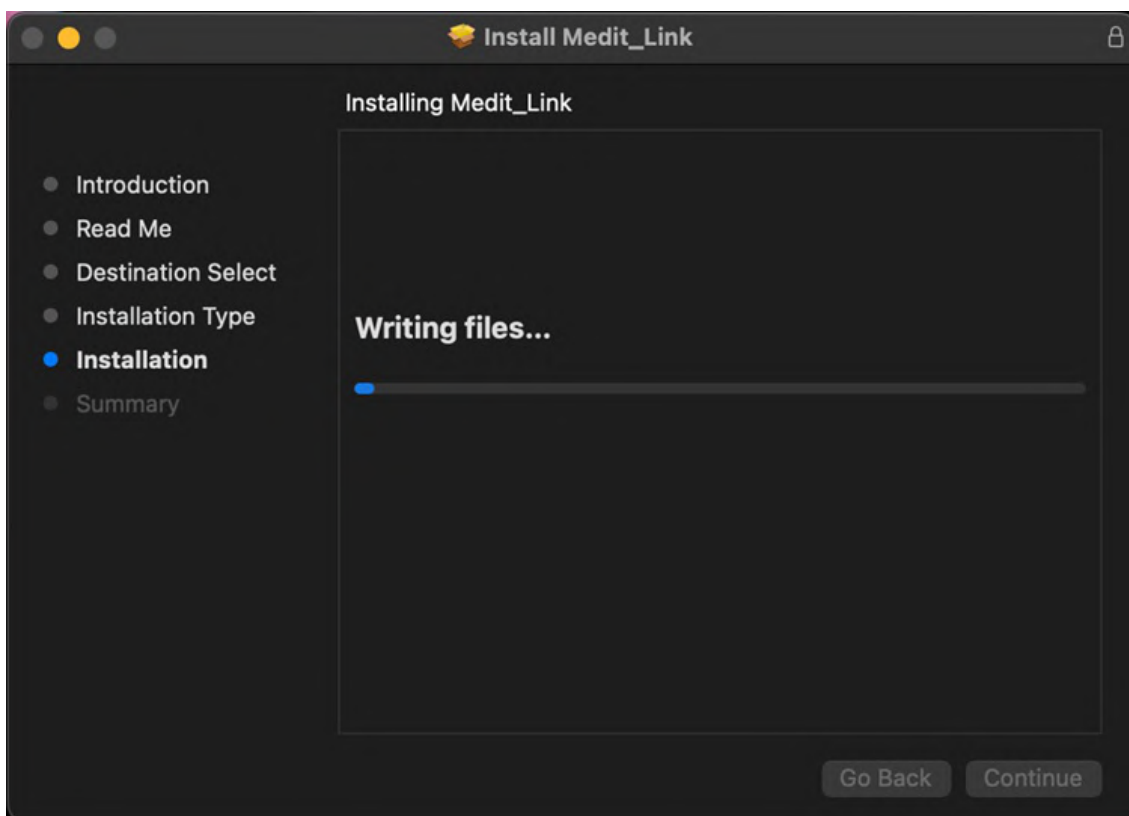


7. انقر على "إغلاق" للخروج من نافذة التثبيت.

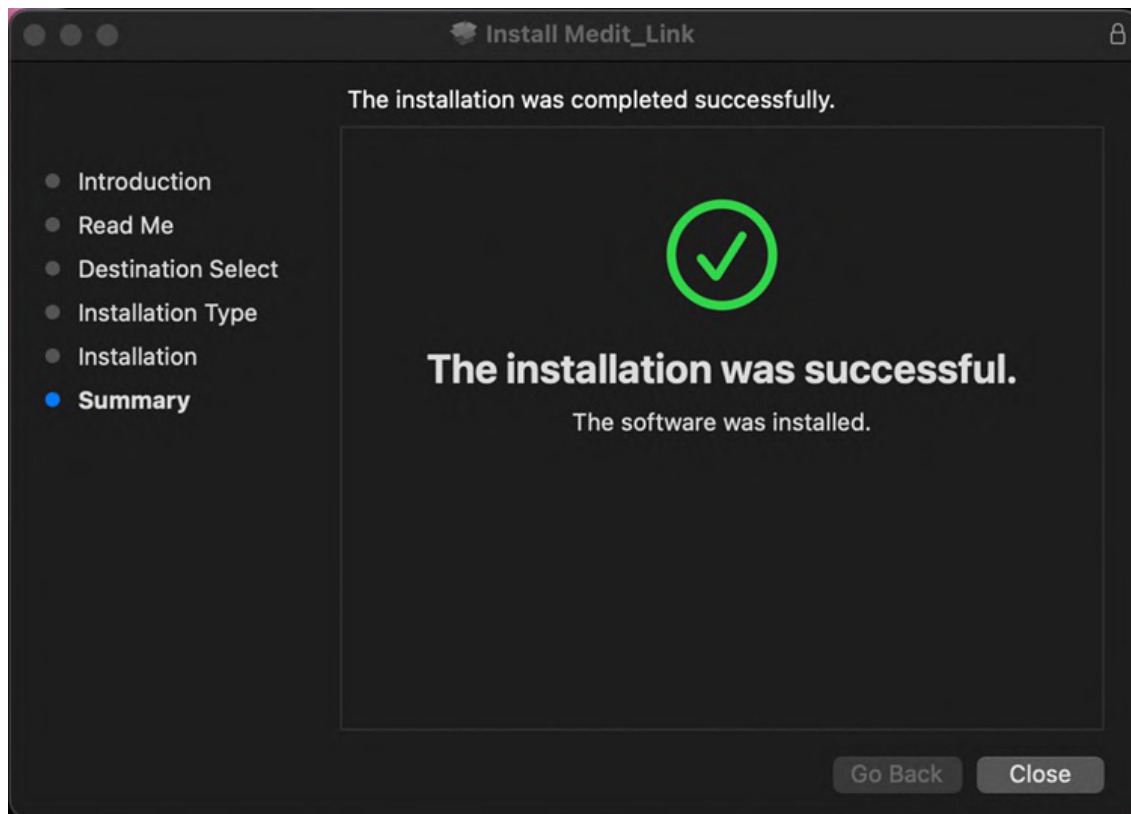

إنشاء حساب وتسجيل الدخول

موقع Medit Link

اشترك في خدمة Medit Link على www.meditlink.com.

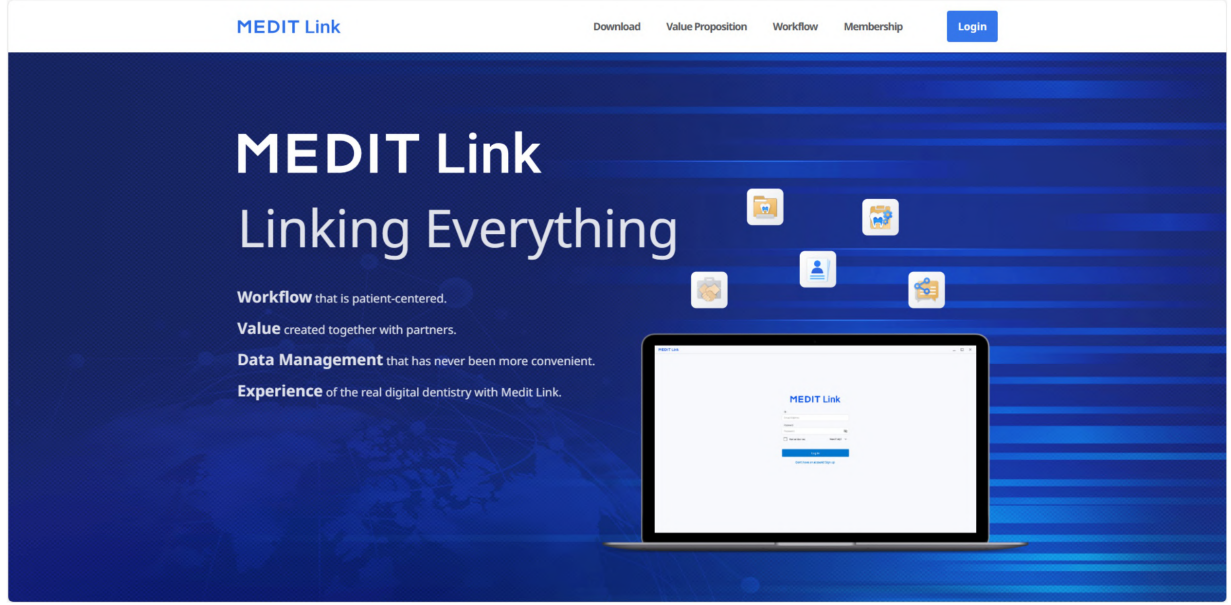

ملحوظة

تسجل في Medit Link China على www.meditlink.cn.

إنشاء حساب

لاستخدام خدمة Medit Link، يجب عليك إنشاء حساب. يمكنك الاستفادة من الميزات المتوفرة في Medit Link بعد إنشاء حساب كعيادة أو مختبر.

يمكن للمستخدمين اختيار أحد أنواع الحسابات الأربعة التالية للحصول على عضوية واستخدام الخدمة بميزات وإمكانيات كاملة أو محدودة، حسب نوع الحساب.

- عيادة - مشرف
- عيادة - عضو
- مختبر - مشرف
- مختبر - عضو

عادةً، يكون المشرف ممثلًا عن مؤسستك ويكون له حق الوصول الكامل إلى جميع وظائف وخدمات Medit Link. في المقابل، حساب العضو لديه وصول محدود.

لإنشاء حساب والحصول على عضوية، اتبع الخطوات التالية:

1. انقر على "ليس لديك حساب بعد؟" أنشؤوا حساب على صفحة تسجيل الدخول.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in.

Need help? -

Log In

Don't have an account? Sign up.



English (United States)

2. بعد قراءة الوصف المقدم، انقر على زر "تسجيل" لنوع الحساب الذي تريده.

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register



Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. يظهر نموذج التسجيل التالي.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.
 Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

☒ Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

View

View

View

Back

Register

4. أدخل اسم العيادة أو المختبر ثم، بناءً على نوع الحساب الذي تريده، قم بما يلي:

- إذا كنت تقوم بالتسجيل كمشرف، فانقر على "التحقق من التوفر" لمعرفة ما إذا كان الاسم الذي تم إدخاله متاحًا.
- إذا كنت تقوم بالتسجيل كعضو، انقر على "بحث". يجب أن يقوم المشرف بتسجيل مؤسستك بالفعل قبل أن تنشئ حساب.

5. املأ بقية نموذج التسجيل وانقر على "تسجيل".

ملحوظة

إذا وافقتم على تلقي معلومات تسويقية أثناء التسجيل، فسوف تتلقون معلومات مفيدة حول المنتج والخدمة من Medit.

6. سيتم إرسال بريد إلكتروني للتحقق لك.

7. لإكمال عملية التسجيل، تحقق من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك باستخدام الرابط المستلم.

تسجيل الدخول وصفحة الترحيب

1. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول وانقر على "تسجيل الدخول".

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help?](#)

[Log In](#)

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) 

2. سيظهر مربع الحوار التالي إذا لم تقوموا بملء معلومات عملكم.

Welcome, stage-test-wh!



Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#) [Go to My Clinic](#)

ملحوظة

لاستخدام خدمات Medit Link، يجب إدخال معلومات عيادتكم أو مختبركم باستخدام حساب المشرف.


3. انقر على الزر "الذهاب إلى عيادتي" أو "الذهاب إلى مختبري" وأدخلوا معلومات العيادة أو المختبر، بما في ذلك اسم الشركة، صور الغلاف/الشعار، الخدمات التي تقدموها، عنوان المكتب، رقم المكتب وما إلى ذلك.

4. المعلومات التي تم إدخالها في صفحة الترحيب يمكن تعديلها في أي وقت على تبويب My Info < عيادتي أو مختبري على موقع Medit Link.

Dashboard

نظرة عامة على الـ Dashboard

يمكنك عرض الإحصائيات الخاصة بجميع الأعمال المنجزة على Medit Link في الرسوم البيانية والمخططات المرئية - سواء في تطبيق Medit Link أو على الموقع الإلكتروني.

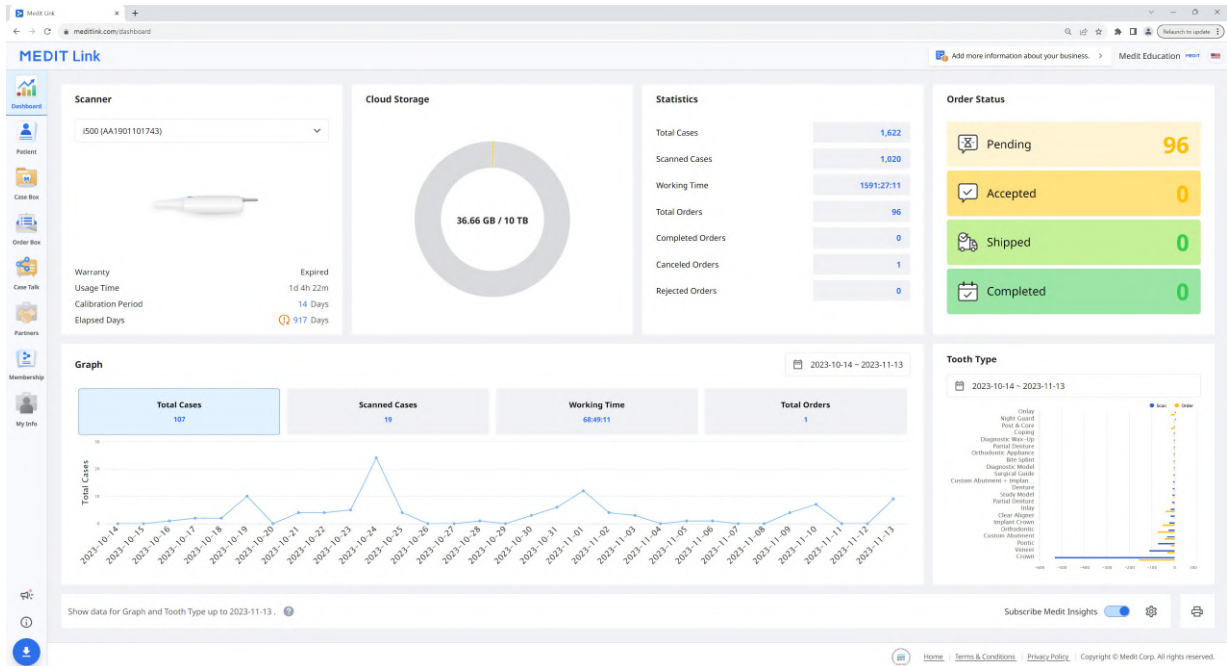

تعرض الرسوم البيانية والمخططات في الـ Dashboard إحصائيات لجميع الأعمال المنجزة في Medit Link.

الماسح الضوئي	قم بتوفير معلومات حول الماسحات الضوئية النشطة، بما في ذلك الضمان، وقت استخدام الماسح الضوئي، الفاصل الزمني للمعايرة والوقت المنقضي للمعايرة.
التخزين السحابي	عرض السعة الإجمالية للسحابة والمقدار المستخدم.
الإحصائيات	تقديم إحصائيات عن الحالات بناءً على حالة العمل.
حالة الطلب	تقديم إحصائيات عن الحالات بناءً على حالة الطلب.
الرسم البياني	رسم معلومات الوظيفة حسب الفترة الزمنية.
نوع السن	توفير إحصائيات عن عدد عمليات المسح والطلبات حسب معلومات العلاج.


Medit Insights

Medit Insights هي خدمة تقارير تساعدك على تحليل إحصائيات الاستخدام الخاصة بك.

ملحوظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

Medit Insights •

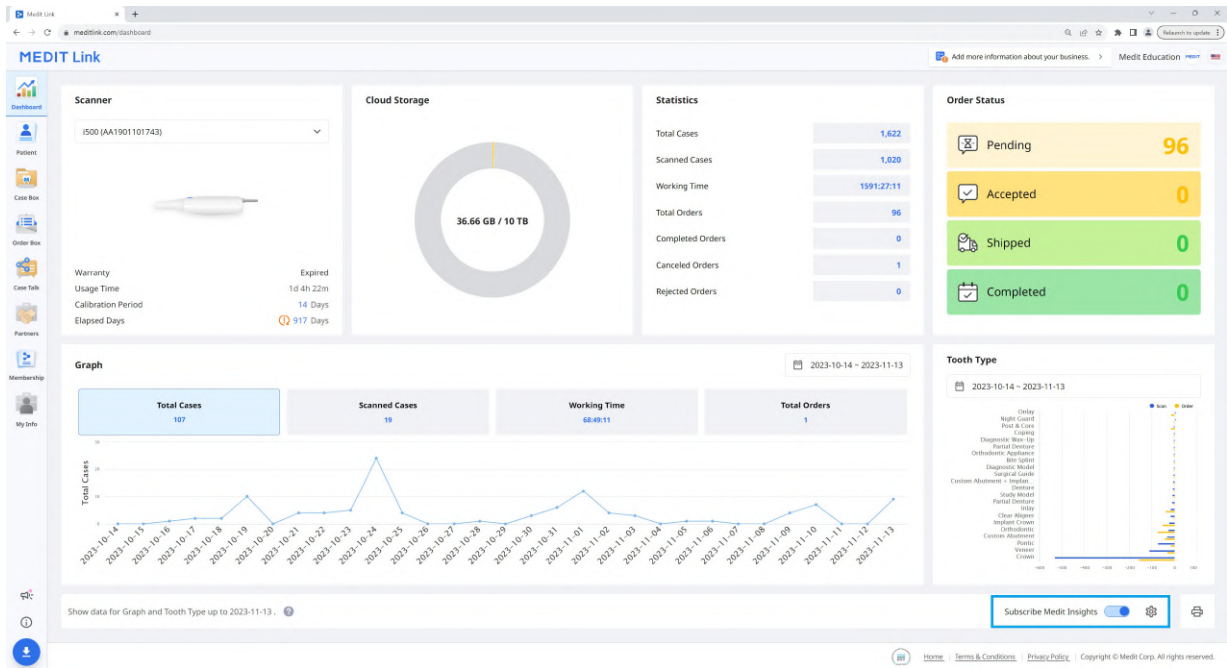

الاشتراك في Medit Insights

يمكنك تلقي بريد إلكتروني للتقرير في اليوم الثاني من كل شهر. لا يلزم إجراء عملية تسجيل إضافية. قم بتمكين "اشتراك في Medit Insights" فقط

إذا كنت لا تستخدم عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته لحساب Medit Link، فيمكنك تعيين عنوان بريد إلكتروني آخر لتلقي Medit Insights.

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account
 ☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

في اليوم الثاني من كل شهر، ستصلك رسالة على البريد الإلكتروني تحتوي على الإحصائيات، كما هو موضح أدناه.

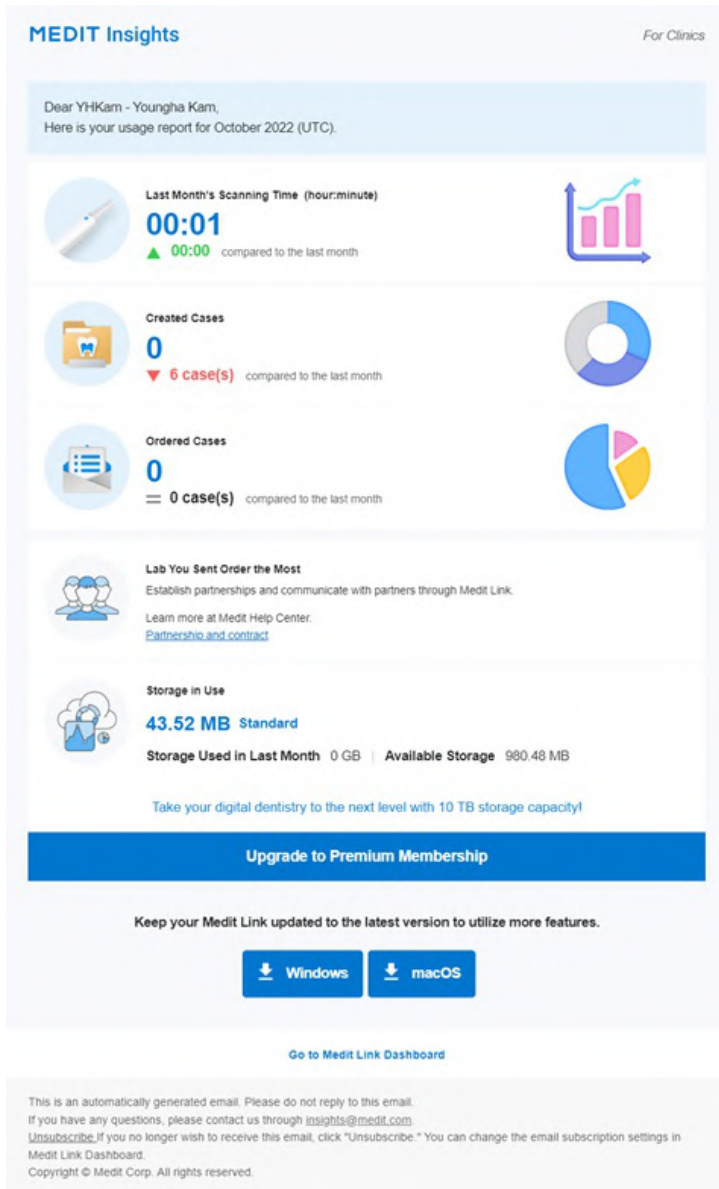

يوفر Medit نصائح ومعلومات مفيدة هنا. * إذا كنت لا تريد رؤية اللافتة، فقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار "اتفاقية التسويق والترويج" في معلوماتي < حسابي.	لافتة
يتم عرض معلومات الإحصائيات، مثل وقت المسح، والحالات التي تم إنشاؤها، والمختبر الأكثر طلباً، وما إلى ذلك.	المعلومات الإحصائية
يوفر الزر رابط تنزيل Medit Link.	تنزيل Medit Link
تستند جميع المعلومات الإحصائية إلى معلومات الـ Dashboard الخاص بك. يمكنك رؤية المزيد من التفاصيل في الـ Dashboard.	Dashboard

إلغاء الاشتراك في Medit Insights

قم بتعطيل "الاشتراك في Medit Insights" في لوحة التحكم أو انقر على "إلغاء الاشتراك" في البريد الإلكتروني المستلم.

Patient

يمكنك إدارة الحالات بناءً على اسم المريض ورقم تعريف المريض.

يتم عرض جميع المرضى المسجلين من خلال تطبيق Medit Link في القائمة، مما يسهل إدارة المرضى وحالاتهم.

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
Glidewell_fastdesign	Glidewell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hk.lee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

البحث عن المرضى

1. حدد معايير البحث الخاصة بك بين اسم المريض أو رقم تعريف المريض من القائمة المنسدلة الموجودة أعلى يمين قائمة المرضى.

View Options

Patient ID ↑ Search Patient ID

Patient Name


Patient ID

2. أدخل اسم المريض أو رقم تعريف المريض للبحث وفقاً لمعايير البحث المختارة.

3. يتم عرض المرضى الذين لديهم الاسم أو الرقم التعريفي التي تم إدخالهم فقط في القائمة.

Case Box/Work Box

تظهر الـ Case Box (العيادة) أو الـ Work Box (المختبر) جميع الحالات التي أنشأها المستخدم في تطبيق Medit Link. يمكنك رؤية الملفات عبر متصفح الويب دون تثبيت برنامج منفصل.

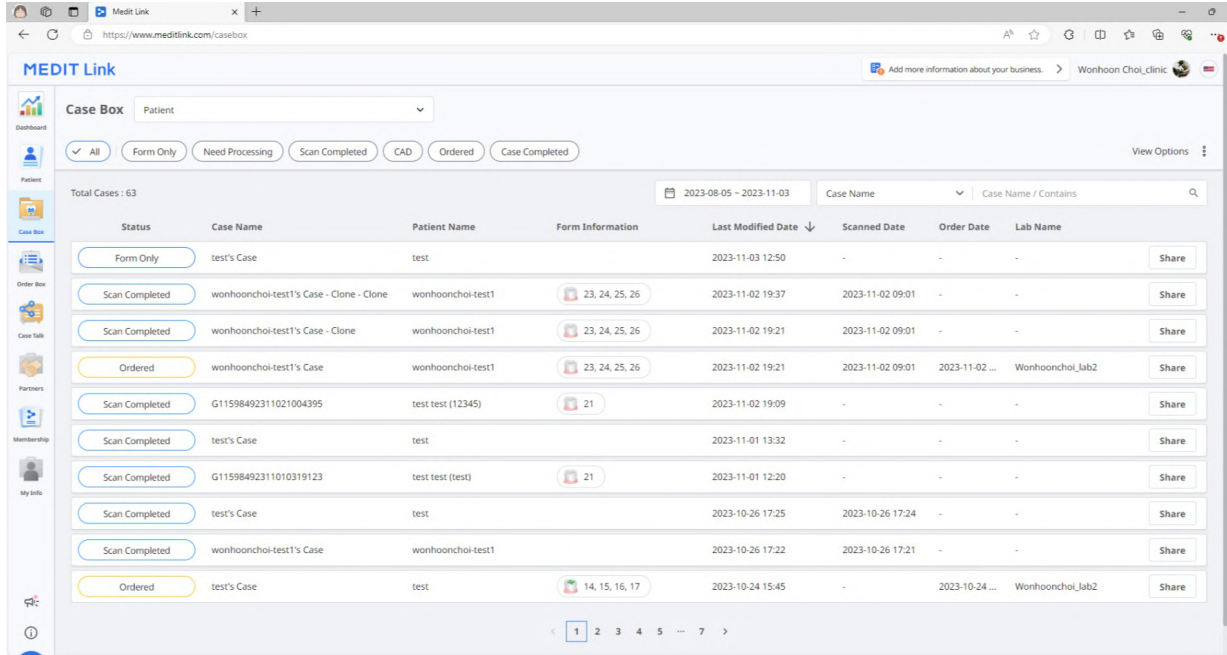


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a 'Case Box' dropdown menu set to 'Patient'. Below it are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A 'View Options' link is on the right. The main area displays 'Total Cases: 63' and a date range '2023-08-05 - 2023-11-03'. A search bar is available. The table below lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. Each row has a 'Share' button.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2

فلتر الحالات


فلتر حسب المريض

يمكنك فلتر الحالات حسب المريض. إنها مفيدة عندما تبحث عن حالات لمرضى محددين.

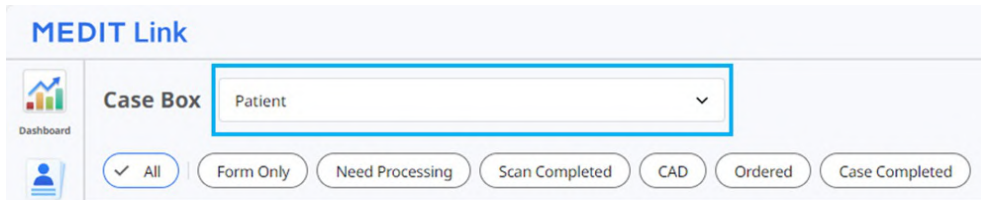

The screenshot shows the 'Case Box' filter section. It has a 'Patient' dropdown menu. Below it are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. أدخل اسم مريض في حقل البحث.

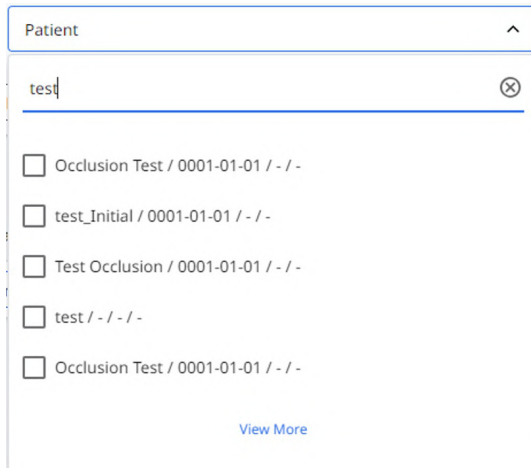

The screenshot shows the patient search dropdown menu. It has a search bar with 'test' entered. Below the search bar are several checkboxes with labels: 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -', 'test_initial / 0001-01-01 / - / -', 'Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -', 'test / - / - / -', and 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -'. There is a 'View More' link at the bottom.

2. اختر مريضًا من قائمة نتائج البحث.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - +2 ^

test

☐ test / - / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☐ test_initial / 0001-01-01 / - / -

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)

☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -

☒ test / - / - / -

3. يتم عرض الحالات الخاصة بالمرضى المحددين فقط في القائمة، مما يسهل العثور على الحالات التي تريد العمل عليها.

MEDIT Link

Case Box Patient

☒ All ☐ Form Only ☐ Need Processing ☐ Scan Completed ☐ CAD ☐ Ordered ☐ Case Completed

Total Cases : 63

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Share
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share

الفترة حسب الحالة

يمكنك فلترة الحالات بناءً على حالاتها.

☐ All ☒ Form Only ☐ Need Processing ☒ Scan Completed ☐ CAD ☐ Ordered ☐ Case Completed

- يمكن للمستخدم النقر على الحالة التي يريد عرضها. سيعرض المتصفح فقط الحالات ذات الحالة المختارة.
- يمكن للمستخدم تحديد حالات متعددة في وقت واحد.

يتم توفير أنواع الحالات التالية بناءً على نوع الحساب:

All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed	Case Box (العيادة)
All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done	Work Box (المختبر)

الفترة حسب المدة

يمكنك فلترة وعرض الحالات التي تم تعديلها خلال الفترة التي حددتها.

1. انقر على فلترة المدة.

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. حدد النطاق.

Last 30 Days ▾

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- الكل: إظهار كل الحالات.
 - النطاق المُخصص: حدد تاريخي البدء والانهاء لعرض الحالات التي تم تعديلها خلال تلك الفترة.
 - اليوم: عرض الحالات التي عُدلت اليوم.
 - أمس: عرض الحالات التي عُدلت أمس.
 - آخر 7 أيام: عرض الحالات التي عُدلت خلال آخر 7 أيام، باستثناء اليوم.
 - آخر 30 يومًا: عرض الحالات التي عُدلت خلال آخر 30 يومًا، باستثناء اليوم.
 - آخر 90 يومًا: عرض الحالات التي عُدلت خلال آخر 90 يومًا، باستثناء اليوم.
 - هذا الشهر: عرض حالات هذا الشهر.
 - الشهر السابق: عرض حالات الشهر السابق.
- سيتم تحديث قائمة الحالات في الوقت الفعلي مع الحالات التي تم إنشاؤها أو آخر تعديل لها خلال المدة المحددة.

الفترة حسب البحث

يمكنك الاستفادة من إمكانيات البحث للبحث عن المعلومات المطلوبة بسهولة وسرعة.

Case Name ▾


| Case Name / Contains



يتم توفير خيارات البحث التالية بناءً على نوع الحساب:

اسم الحالة، اسم المريض، رقم تعريف المريض، اسم المختبر	Case Box (العيادة)
اسم الحالة، اسم المريض، اسم العيادة، رقم تعريف الطلب	Work Box (المختبر)

تفاصيل الحالة

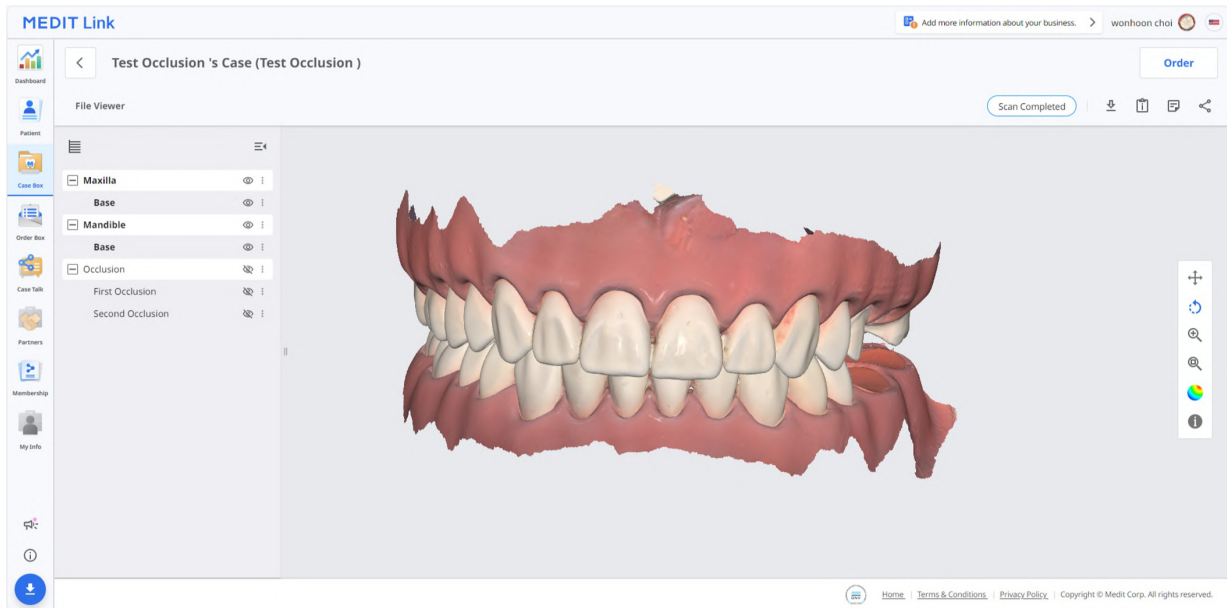

يتم توفير أدوات إدارة الحالة التالية في Case Box/Work Box.

حالة الحالة	عرض حالة الحالة.
انتقل إلى Order Box/In Box	توفير اختصار للحالة نفسها في box آخر (Case Box ↔ Order Box ↔ In Box ↔ Work Box).
تنزيل	تنزيل الملفات الموجودة في الحالة على جهاز الكمبيوتر المحلي.
معلومات الحالة	راجع تفاصيل الحالة واحفظها كملف PDF أو اطبعها.
المذكرة والعلامات	أضف مذكرة أو علامات عند التسجيل أو طلب حالة. استخدمها لتوصيل أي معلومات إضافية أو تكميلية عن الحالة لشركائك.
مشاركة	قم بإنشاء رابط للمشاركة. يمكن للمستخدمين الذين لديهم رابط مشترك الوصول إلى البيانات ثلاثية الأبعاد في مستعرض مثل Chrome أو Firefox أو Safari بدون تثبيت برامج إضافية.

Order Box/In Box

يعرض Order Box (العيادة) أو In Box (المختبر) الحالات المطلوبة في تطبيق Medit Link.

تفاصيل الطلب

1	عرض اسم الحالة واسم المريض.
2	توفير وظائف لإدارة الطلبات (القبول/الإلغاء ؛ التسليم/الاستلام).
3	إظهار علامات التبويب المتاحة: الطلب، عارض الملفات
4	عرض وظائف لإدارة الحالات والملفات: حالة الحالة، الاختصارات للحصول على معلومات مفصلة، معلومات الحالة، المذكرة & العلامات، إلخ.
5	عرض المعلومات التفصيلية للطلب بما في ذلك رقم الطلب، اسم المريض، اسم الشريك، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة & العلامات.
6	عرض معلومات المنتج المطلوب وحالة التسليم.


علامات التبويب في Order Box/In Box

طلب	عارض الملفات
تحقق من المعلومات التفصيلية الخاصة بالطلب، مثل رقم تعريف الطلب، اسم المريض، اسم الحساب، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة والعلامات.	تحقق من الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة عمليات المسح/CAD. يعرض عارض الملفات ويدير النماذج ثلاثية الأبعاد والصور ثنائية الأبعاد التي تم الحصول عليها أو المرفقة.

Case Talk

يمكن مشاركة الحالات التي تم إنشاؤها في Medit Link مع أشخاص تحددهم، أو أي شخص لديه الرابط المشترك أو أعضاء مسجلين في Medit Link.

يمكن للمستخدم رؤية قائمة بجميع الحالات المشتركة من خلال "Case Talk" في تطبيق Medit Link و موقع Medit Link.

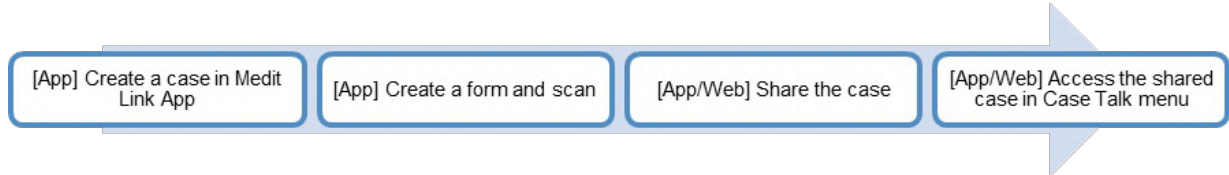

يمكن عرض الحالات المشتركة عبر مستعرض ويب دون تثبيت برنامج منفصل، مما يتيح سهولة التواصل في ما يتعلق بالبيانات ثلاثية الأبعاد على أجهزة مختلفة.


إنشاء Case Talk

يمكنك إنشاء رابط مشترك لحالة تم إنشاؤها في Case Box/Work Box.

1. ابحث عن حالة تريد مشاركتها وانقر على الزر "مشاركة" على اليمين.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share

2. حدد الملفات التي تريد مشاركتها.

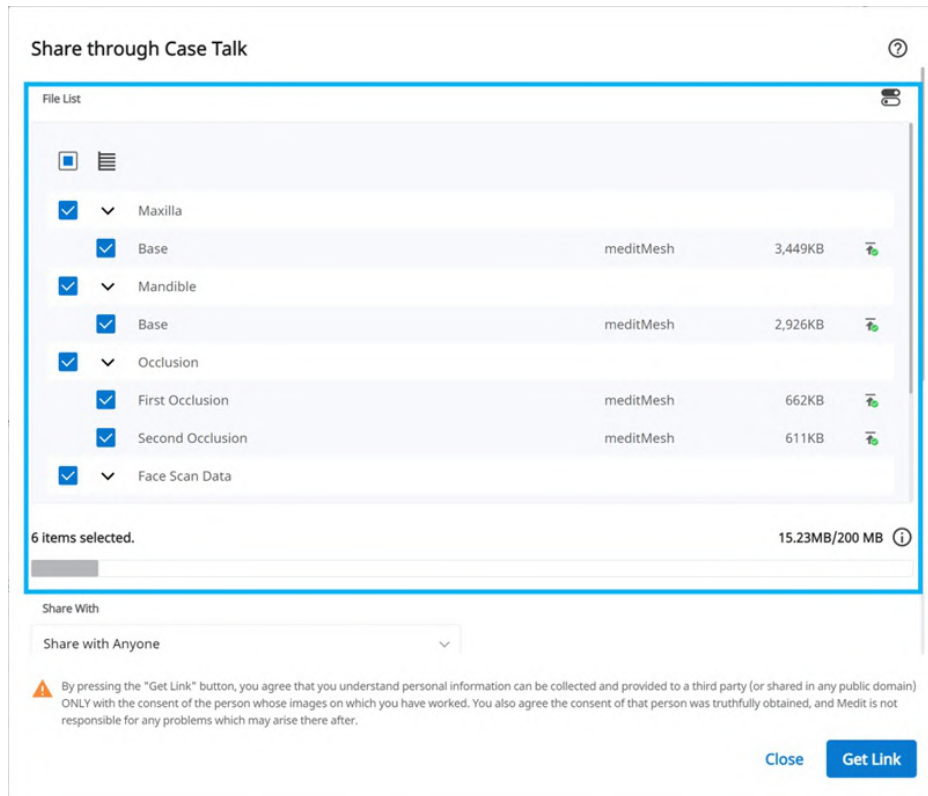

3. قم بتعيين نوع إذن المشاركة وخيارات المشاركة.
4. انقر على "الحصول على رابط" لإنشاء رابط مشترك.

تحديد نوع إذن المشاركة وخيارات المشاركة

Share through Case Talk



Share With

Share via

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024


By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link

المشاركة مع أي شخص يتم إنشاء رابط مشترك. يمكنك مشاركة الملفات مع أي شخص. المشاركة مع أشخاص معينين يتم إنشاء رابط مشترك وإرساله إلى أشخاص محددين.	المشاركة مع
إذا حددت "مشاركة مع أشخاص معينين"، فيمكنك مشاركة الرابط مع أشخاص معينين بطرق مختلفة. عنوان البريد الإلكتروني رسالة قصيرة الشركاء	المشاركة عبر
تحديد تاريخ انتهاء صلاحية الرابط. بعد انتهاء صلاحية الرابط، لن يتمكن الأشخاص الذين شاركته معهم من الوصول إلى الملفات. يمكنك تمديد فترة الصلاحية حتى 90 يومًا ابتداءً من اليوم.	تاريخ انتهاء الصلاحية
قم بتعيين رمز وصول مكون من 6 أرقام لضمان أمان البيانات.	الرقم السري
إذا حددت هذا الخيار، فسيُرى جميع الأشخاص الذين لديهم الرابط اسم المريض.	مشاركة اسم المريض
إذا قمت بتحديد هذا الخيار، سيتمكن جميع المستخدمين الذين لديهم الرابط من تنزيل الملفات.	منح إذن التنزيل
- إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فستتمكن من التواصل من خلال الرابط المشترك. - إذا قمت بإلغاء تحديد الخيار، سيتمكن المستلم من عرض تعليقاتك فقط ولكن لن يتمكن من إضافة تعليقاته الخاصة.	السماح بالتعليقات
يمكنك ترك رسالة في قسم التعليقات.	التعليق

يمكنك رؤية الملفات في الحالة المتشاركة. تتوفر الوظائف التالية في صفحة تفاصيل Case Talk.

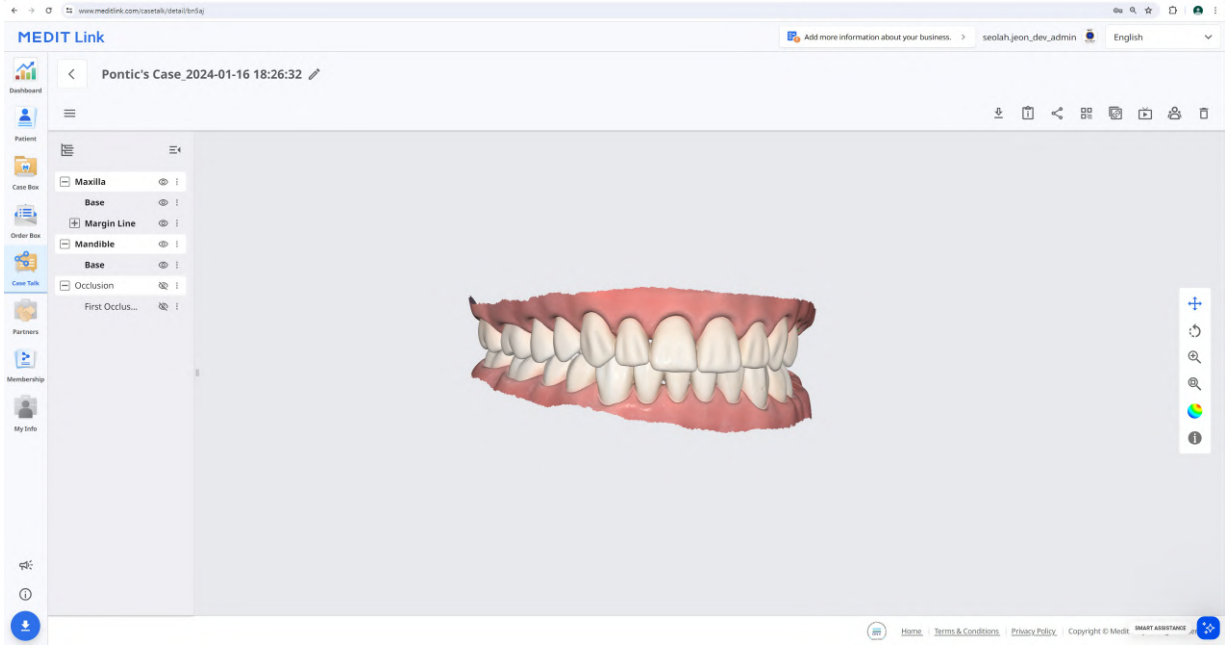

قم بتنزيل جميع الملفات في الحالة على جهاز الكمبيوتر المحلي.	التنزيل	
عرض معلومات مفصلة عن الحالة.	معلومات الحالة	
تعديل إعدادات المشاركة.	مشاركة	
مشاركة الحالة باستخدام رمز الاستجابة السريعة.	رمز الاستجابة السريعة	
انسخ الرابط المشترك إلى الحافظة. يظهر الرابط المنسوخ الملفات المشتركة على متصفح الويب الخاص بك.	نسخ الرابط	
شارك شاشتك مع المستخدمين المتصلين. تتم مزامنة مشاركة الشاشة مع المستخدمين المتصلين.	بث مباشر	
إظهار كافة المستخدمين الذين يدخلون الرابط المشترك.	الحاضرين	
حذف الرابط المشترك. لم يعد الرابط المشترك المحذوف قابلاً للوصول.	الحذف	

ملحوظة


الخدمات التالية غير متوفرة على MEDIT Link China.

- بث مباشر
- الحاضرين

Web Viewer

يمكنك عرض البيانات المشتركة من خلال Case Talk في متصفح الويب.

من الممكن التواصل مع الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الرابط باستخدام الملاحظات والتعليقات.

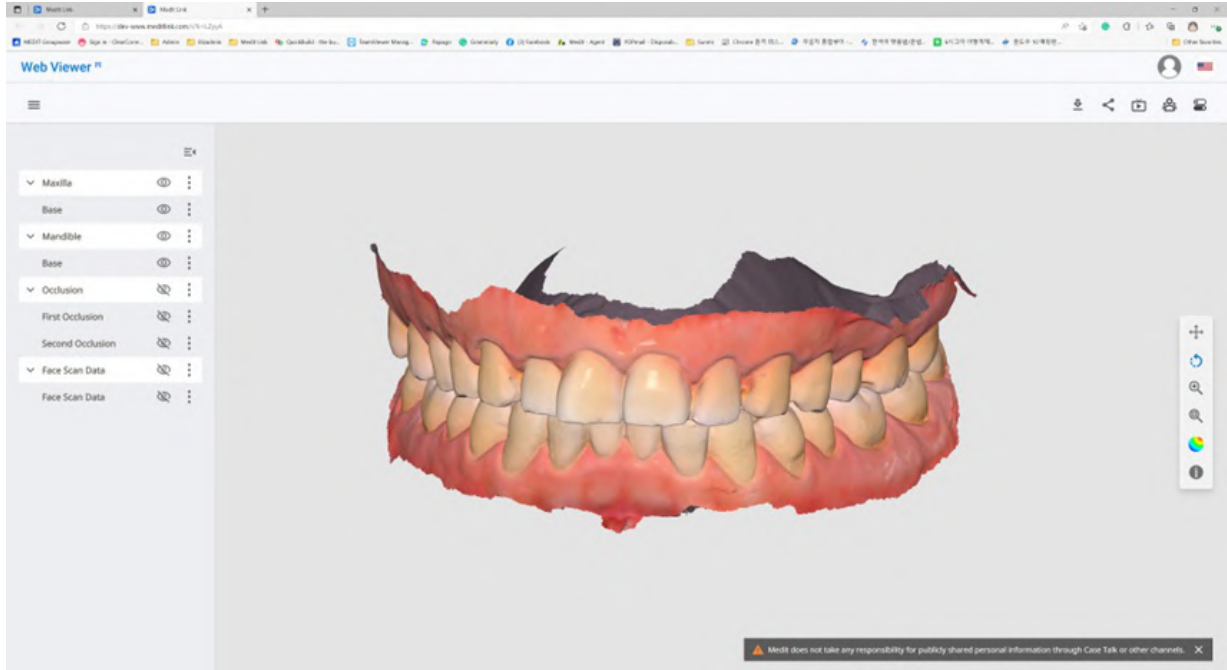

تحميل جميع ملفات هذه الحالة على جهاز الكمبيوتر.	التحميل	
عرض معلومات مفصلة عن القضية.	معلومات الحالة	
تعديل إعدادات المشاركة.	مشاركة	
انسخ الرابط المشترك إلى الحافظة. يظهر الرابط المنسوخ الملفات المشتركة على متصفح الويب الخاص بك.	رمز الاستجابة السريعة	
شارك شاشتك مع المستخدمين المتصلين. تتم مزامنة مشاركة الشاشة مع المستخدمين المتصلين.	بث مباشر	
إظهار كافة المستخدمين المتصلين بالرابط المشترك.	الحاضرين	
تغيير نظام ترقيم الأسنان.	ترقيم الأسنان	


ملحوظة

الخدمات التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- بث مباشر
- الحاضرين

التعليق

يمكنك إضافة تعليقات توضيحية إلى موقع محدد على النموذج ثلاثي الأبعاد. يمكن لأي شخص لديه الرابط عرض التعليقات التوضيحية التي تضيفها.

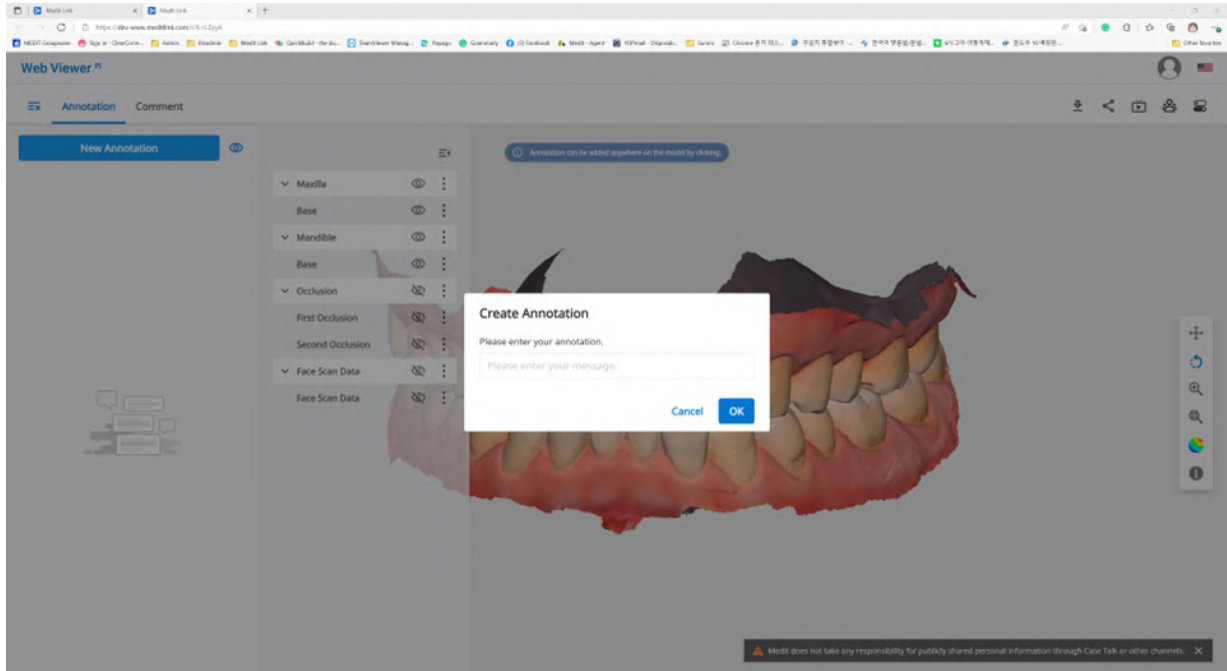

ملحوظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China. • تعليقات

1. ابحث عن رمز القائمة أعلى الزاوية اليسرى وحدد علامة التبويب "تعليق". استخدم زر "تعليق جديد" لإضافة تعليق توضيحي في أي مكان على البيانات بنقرة واحدة.
2. اكتب الرسالة، ثم انقر على "OK" لحفظها.

Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel
OK

3. يمكنك استخدام التعليقات التوضيحية كقناة اتصال بسيطة. انقر على التعليق التوضيحي الذي تم إنشاؤه لإدخال الرد واضغط على "إرسال".

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi
🗑️ ✕

Annotation 1

1
09-09 20:31

Please enter your reply

Send

التعليقات

يمكنك التواصل مع المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى الرابط من خلال علامة التبويب "تعليق" في قائمة ال Web Viewer.

ملحوظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

• تعليق

مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي

يمكنك مشاركة شاشتك في الوقت الفعلي.

ملحوظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

• بث مباشر

1. انقر على "بث مباشر" لمشاركة شاشة ال Web Viewer مع المستخدمين المتصلين.



2. انقر على "OK" لبدء مشاركة شاشتك.



3. يجب على الأشخاص الآخرين الذين قاموا بالوصول إلى الرابط قبول مشاركة الشاشة.

4. يتم عرض شاشة المستخدم الذي بدأ مشاركة الشاشة متزامنة مع شاشة الشخص الذي استلم الطلب.

شجرة البيانات



يتم تجميع جميع البيانات وعرضها وفقًا للسماح الموجودة في شجرة البيانات. يمكنك إظهار البيانات أو إخفاؤها، وضبط العتامة، وما إلى ذلك.

التحكم بشجرة البيانات

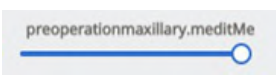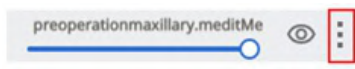إظهار أو إخفاء	انقر على رمز العين لإظهار البيانات أو إخفائها من العرض. تحكم في رؤية البيانات كملف مجموعة أو فردي.
العتامة	قم بتمرير الفأرة فوق عنصر مرئي لرؤية شريط تمرير التعتيم. اضبط شريط التمرير لتغيير شفافية بياناتك. 
قائمة موسعة	يتم توفير القائمة الموسعة على الجانب الأيمن من كل عنصر من عناصر شجرة البيانات. تتضمن الخيارات التالية:  • إظهار هذا فقط: إخفاء كافة البيانات باستثناء البيانات الحالية. • إخفاء: إخفاء البيانات الحالية.

ضوابط النموذج ثلاثي الأبعاد

تحريك كامل	تحريك النموذج.	+
تدوير	تدوير النموذج.	↺
التكبير/التصغير	تكبير وتصغير النموذج.	🔍
التكبير مع الملاءمة	ضع النموذج في وسط الشاشة.	🔍
وضع عرض النموذج	النسيج مفعّل	🌈
	النسيج غير مفعّل	🟤
إظهار البيانات بلون واحد.		
إظهار البيانات بألوان نسيج حقيقية.		

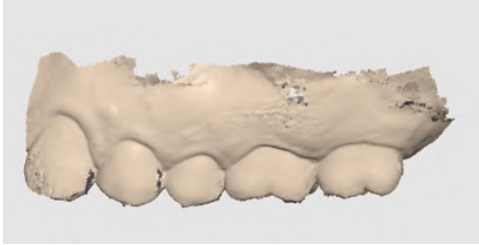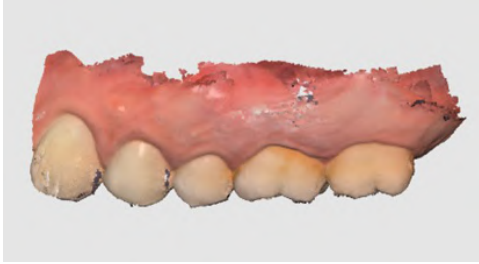

Partners

يمكنك البحث عن شركاء محتملين لطلب الشراكة والاطلاع على قائمة الشركاء الحاليين.

ملحوظة

الخدمات التي تستخدم Google Maps غير متوفرة على Medit Link China.


البحث عن شركاء

يمكنك البحث عن مستخدمي Medit Link بناءً على اسم الشركة و/أو العنوان.

في نتائج البحث، يمكنك إرسال طلب شراكة إلى الشركة التي ترغب في العمل معها.

قائمة شركائي

يمكنك مراجعة شركائك الحالية مع جميع شركائك الحاليين في قائمة شركائي.

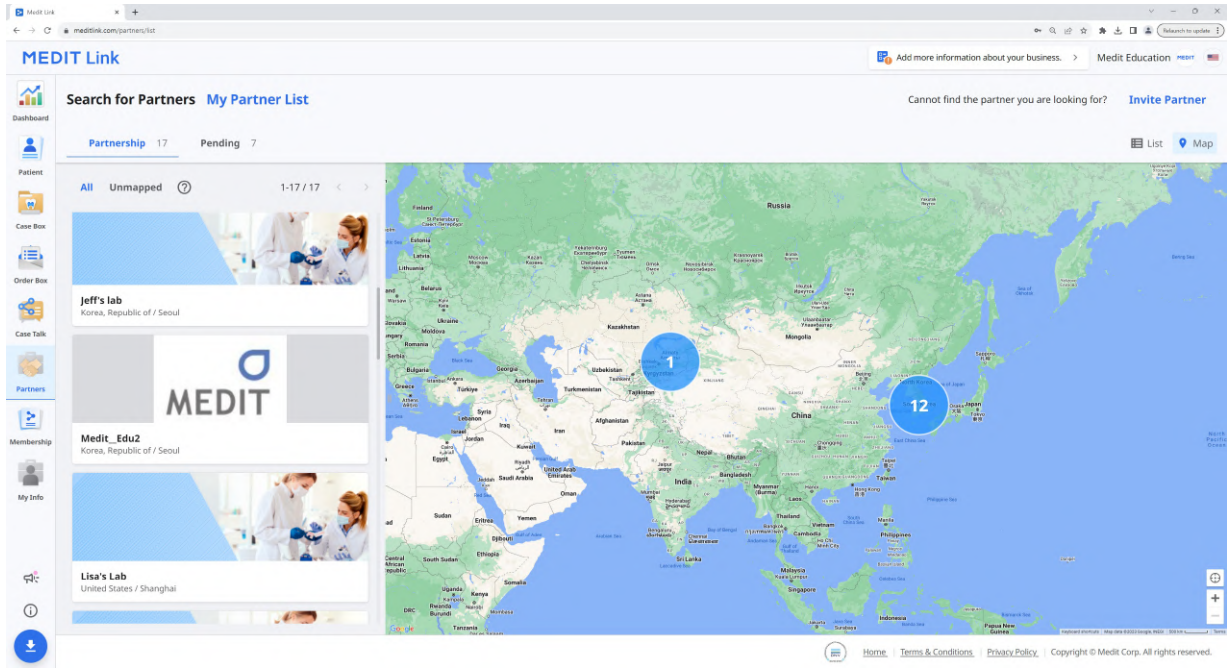

دعوة شركاء

إذا كان هناك عيادة أو مختبر ترغب في العمل معه، يمكنك دعوتهم للانضمام إلى Medit Link. سيتم تشكيل الشراكة تلقائيًا بمجرد قبول الدعوة.

1. انقر على "دعوة شريك" في الجزء العلوي الأيسر من شاشتك.
2. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للشركة التي ترغب في العمل معها وأرسل لها دعوة مع طلب شراكة.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. بمجرد قبول المنظمة المدعوة الدعوة والاشتراك في Medit Link، سيتم إنشاء الشراكة تلقائيًا.

Membership

عضوية

The screenshot displays the Medit Link Membership interface. On the left, a sidebar contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main content area is titled 'Membership' and includes tabs for 'Standard' and 'Premium'. The 'Standard' plan is selected, showing a price of \$0.99 per user per month. It lists benefits: a paid plan, 10 TB of cloud storage, efficiency for many cases, and a one-month free trial. A 'Subscribe' button is visible. Below the plan details, 'Premium Benefits' are listed, including 'Sample Coupon 1' (Medit Partner, expires 2023-02-25), 'Sample Coupon 2' (Medit Partner, expires 2023-02-25), a '5% Off' voucher (Dental Company, expires 2024-04-27), and a 'Sample Boucher' (expires 2024-04-30). A note at the bottom states: 'The promotion has been applied. You can now use the plan until 2021-10-01. View More. If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. Click.' On the right side, the 'Cloud Storage' section shows a 'Set Period' dropdown, a circular progress indicator for 4.75 GB / 10 TB, and a list of storage items: 'Total Selected' (0.00 KB), 'Raw Data' (30.51 GB), and 'Result Files & Attachments' (4.72 GB).

خطة الاشتراك

يمكنك معاينة ما تقدمه كل خطة، بما في ذلك قسائم الخصومات، وحالة اشتراك الحالية. يمكنك ترقية خطتك أو إلغاء اشتراكك في أي وقت.

This screenshot is a zoomed-in view of the 'Standard' plan section from the previous image. It highlights the plan details, including the price of \$0.99 per user per month, the list of benefits (paid plan, 10 TB cloud storage, efficiency, and free trial), and the 'Subscribe' button. The 'Premium Benefits' section is also visible, showing the details of the sample coupons and vouchers, including their expiration dates and the ability to click on them for more information.

يوفر Medit Link خطط العضوية التالية:

Standard

- خطة إعتيادية مجانية لجميع المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول
- 1 GB من التخزين السحابي
- للمستخدمين الجدد

Premium

- خطة اشتراك مدفوعة

- TB 10 من التخزين السحابي
- للمستخدمين ذوو الحالات المتعددة والبيانات المختلفة
- نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد


Premium	Standard	
TB 10	GB 1	التخزين السحابي
0.99\$ في الشهر	مجاني	الرسوم الشهرية
* لا يحسب التخزين السحابي المساحة التي تشغلها البيانات الأولية.		

ملحوظة

ستكون خطط العضوية متاحة على Medit Link China. يمكنك الحصول على خطة Premium مجاناً حتى الإصدار الرسمي للميزة.

التخزين السحابي

في القسم الأيمن، يمكنك إدارة التخزين السحابي الخاص بك.

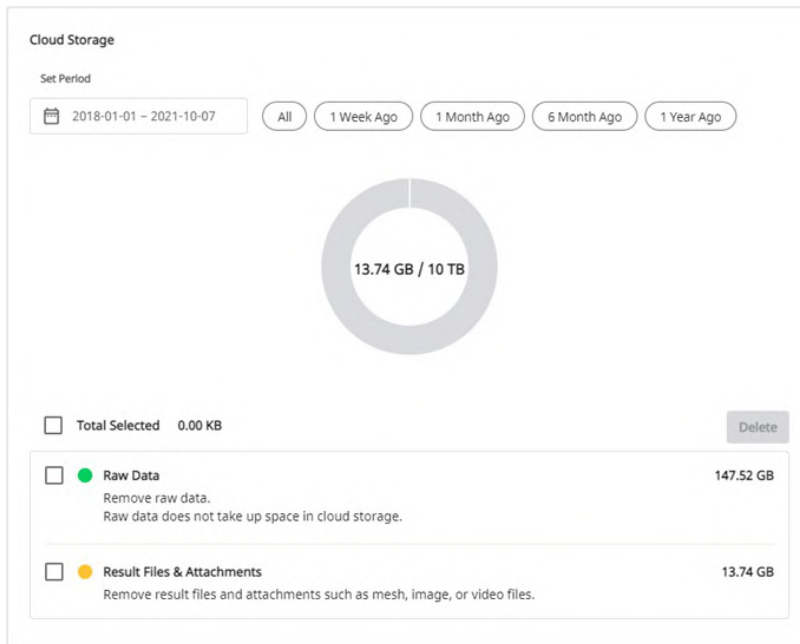

قم بتعيين الفترة التي يتم حذف البيانات بعدها. • الكل: مشاهدة كل الملفات. • منذ أسبوع واحد: راجع الملفات التي مَرَّ أسبوع على إنشائها. • منذ شهر واحد: راجع الملفات التي انقضى شهر على إنشائها. • منذ 6 أشهر: راجع الملفات التي مرت ستة أشهر على إنشائها. • منذ عام واحد: راجع الملفات التي مَرَّ عام على إنشائها.	تحديد الفترة
لا تشغل البيانات الخام مساحة في التخزين السحابي، لذلك لن تكون في الدائرة البيانية. ولكن يمكنك إدارة البيانات الخام من هنا إذا لزم الأمر، على سبيل المثال، حذفها لحماية معلومات المريض الخاصة.	البيانات الخام
تشغل ملفات النتائج والمرفقات مساحة في السحابة. إذا كانت السحابة ممتلئة، يمكنك تأمين المزيد من مساحة التخزين عن طريق إزالة الملفات غير الضرورية.	النتائج & المرفقات
قم بإزالة الملفات المحددة من التخزين السحابي لتحرير مساحة.	حذف

الاشتراك

إذا كنت مشتركاً حالياً في الخطة Standard أو الخطة Premium مع رمز استرداد، فيمكنك الاشتراك في الخطة Premium.

يتم إتمام الدفع من خلال خدمة Stripe على www.stripe.com.

1. اذهب إلى العضوية > خطة الاشتراك < Premium وانقر على زر "الاشتراك".

Membership Billing Info Redeem

Plan

Standard **Premium**

\$ 0.99 per user, per month

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

Subscribe

Premium Benefits

2. تحقق من وصف خطة Premium وانقر على "اشتراك" مرة أخرى.

Subscribe Membership



Premium
0.99\$ USD / Monthly
The first month is free if you join the membership.

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

* VAT is not included.
* If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. Click

Cancel **Subscribe**

3. تحقق من السعر والشروط وأدخل المعلومات اللازمة للدفع. بعد ذلك، انقر على "اشتراك".

← **MEDIT Link** **TEST MODE**

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00
Then \$0.99 per day after coupon expires

Premium membership for Clinic	\$0.99
Medit Link Membership	
Billed daily	

Subtotal	\$0.99
1 MONTH FREE – for first subscription	-\$0.99
100% off for a day	

Total due today	\$0.00
-----------------	--------

Pay with **link** ⇒

Or pay with card

Email **yhgam0829@gmail.com**

Card information

1234 1234 1234 1234 

MM / YY CVC 

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea ▼

☐ Securely save my information for 1-click checkout
Pay faster on MEDIT SG PTE. LTD. and everywhere Link is accepted.

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by **stripe** | Terms Privacy

4. قد يستغرق الدفع عدة ثوان. عند الانتهاء، سترى رسالة التأكيد.

Subscribe Membership



Payment Successful.

Invoice

Close


إلغاء الاشتراك

يمكنك إلغاء الاشتراك من العضوية في أي لحظة. بعد إلغاء الاشتراك، سيظل بإمكانك استخدام عضوية Premium للأيام المتبقية من الشهر المدفوع. سيتم تغيير خطتك إلى إعتيادية اعتبارًا من يوم الدفع التالي، وستقتصر مساحة التخزين السحابية على 1 GB. إذا تم تجاوز سعة التخزين السحابية، فلن يتم نسخ الملفات احتياطيًا، ولن تتوفر وظائف الطلب والمشاركة.


1. انقر على "إلغاء الاشتراك".

2. انقر على "إيقاف الاشتراك".

Cancel Subscription

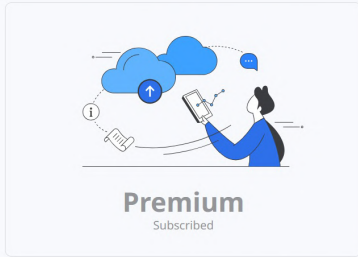

Premium
Subscribed

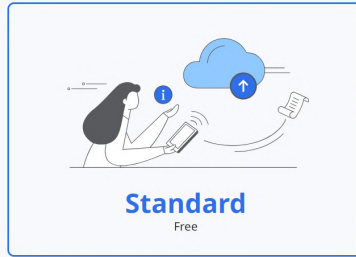

Standard
Free

Are you sure you want to unsubscribe?

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

Cancel Subscription

Stay Subscribed

3. لتأكيد رغبتك في إلغاء الاشتراك، انقر على "إلغاء الاشتراك" مرة أخرى في النافذة المنبثقة الجديدة.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription

Stay Subscribed

4. تم إلغاء اشتراكك.

5. سيتم تغيير خطتك إلى إعتيادية اعتبارًا من يوم الدفع التالي، وستقتصر مساحة التخزين السحابية على 1 GB. إذا تم تجاوز سعة التخزين السحابي، فلن يتم نسخ الملفات احتياطيًا، ولن تتوفر وظائف الطلب والمشاركة.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.
Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.
If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

Close

معلومات الفواتير

يمكنك التحقق من سجل الدفع لاشتراكات العضوية، بما في ذلك فاتورة لكل دفعة. يمكنك أيضًا إضافة أو تغيير طريقة الدفع، والتي سيتم تطبيقها بدءًا من الدفعة المجدولة التالية.

[Membership](#) [Billing Info](#) [Redeem](#)

My Plan and Billing Information
Plan: Premium
Amount: 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date: 2021-09-09
Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)
If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

كيفية إضافة طريقة دفع

1. انقر على "تعديل طريقة الدفع".

[Membership](#) [Billing Info](#) [Redeem](#)

My Plan and Billing Information
Plan: Premium
Amount: 0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date: 2021-09-09
Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)
If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. انقر على "إضافة طريقة دفع".

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

+ Add payment method

3. أدخل المعلومات المطلوبة وانقر على "أضف".

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. سيتم تعيين طريقة الدفع المضافة كطريقة افتراضية واستخدامها للدفع التالي.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

كيفية تغيير طريقة الدفع

1. انقر على رمز القائمة الموسعة بجوار طريقة الدفع التي تريد تغييرها في نافذة حوار الفوترة.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556	Default	Expires 11/2021	×
VISA **** 4242		Expires 11/2021	...
+ Add payment method			

2. انقر على "جعله افتراضياً" لتعيين البطاقة المحددة كطريقة الدفع الافتراضية.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556	Default	Expires 11/2021	×
VISA **** 4242		Expires 11/2021	...
+ Add payment method			

[Make default](#)
[Delete](#)


BILLING INFORMATION

الاسترداد

قم بتسجيل رمز الاسترداد المقدم كجزء من العرض الترويجي. يمكنك استخدام عضوية Premium مع رمز الاسترداد.

تسجيل رمز الاسترداد

1. أدخل رمز الاسترداد وانقر على "تسجيل".

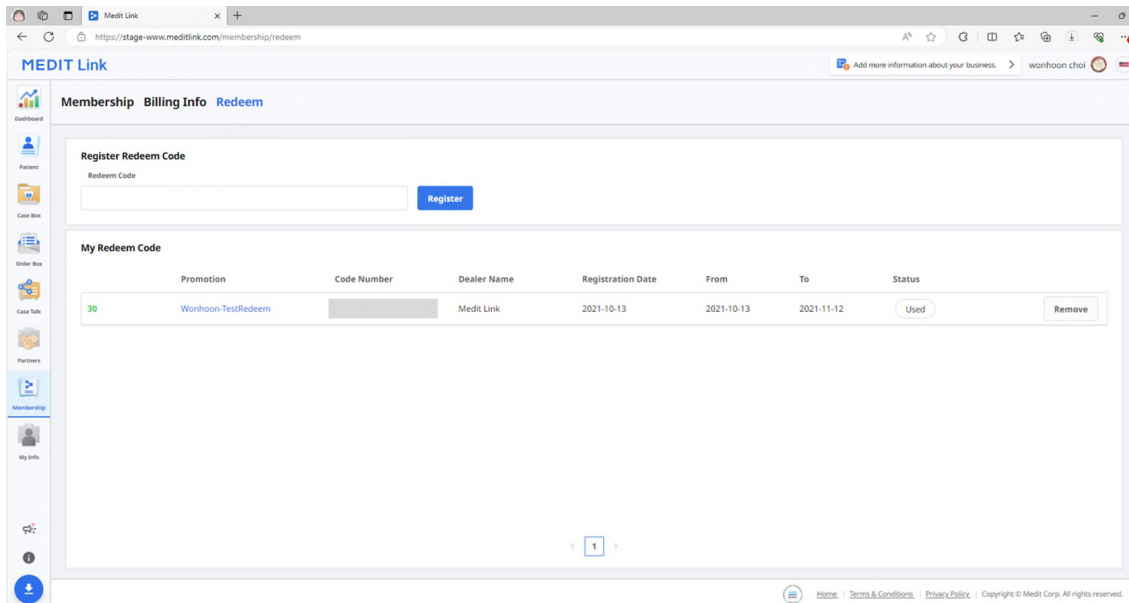

2. اقرأ الإشعار واختر "تسجيل" أو "تطبيق" في مربع الحوار المنبثق.
 - تسجيل : قم بتسجيل رمز الاسترداد. يمكنك تفعيل واستخدام رمز الاسترداد لاحقًا بعد التسجيل.
 - تطبيق: سجل وقم بتفعيل رمز الاسترداد. ينطبق الخصم الترويجي على الفور.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
 Register allows you to apply and activate when you need it, If
 applied immediately, it will start after the expiration of the active
 promotion.
 Periodic payments are stopped automatically.

Close
Register
Apply

تفعيل رمز الاسترداد

يمكنك تسجيل رموز استرداد متعددة، لكنك تحتاج إلى تفعيل الرمز الذي تريد استخدامه.

1. انقر على الزر "تفعيل" بجوار الرمز الذي تريد استخدامه.
 - إذا لم يكن هناك رمز بالحالة "Activated"، فسيتم تطبيق الرمز الذي تختاره على الفور.
 - في حالة وجود رمز مفعّل بالفعل، يتغير الرمز المحدد حديثاً إلى حالة "Waiting". عندما تنتهي صلاحية رمز الاسترداد المنشط حالياً، سيتم تفعيل رمز الاسترداد الجديد في حالة "Waiting" تلقائياً.

ملحوظة

يمكن تفعيل رمز استرداد واحد فقط، ويمكن أن يكون رمز استرداد واحد فقط في حالة "Waiting".

My Info

حسابي

يمكنك مراجعة وتعديل المعلومات التي قدمتها أثناء التسجيل والتحقق من حالة عضويتك.

← → ↻ www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Account Information



Email Address
seolah.jeon@medit.com [Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
seolah.jeon_dev_admin

Language
English ▼

Country/Region
Korea, Republic of ▼

ⓘ Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification.

عيادتي/مختبري (حساب المشرف فقط)

يمكنك مراجعة وتعديل المعلومات المتعلقة بعيادتك أو مختبرك. هذا القسم متاح فقط لحسابات المشرف.

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Par

1 2 3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

الماسح الضوئي الخاص بي

يمكنك التحقق من معلومات الجهاز المتصل للحساب.

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Add more information about your business. > seolah.jeon

No.	Type	Serial Number	Usage Time ①	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ①	
1	i500	-	-	-	-	-	-	-	
2	i500	AA1911104453	0d 7h 18m	2023-04-14 12:48	2020-02-14 15:49	2019-12-02	2021-06-01	Expired	
3	i500	AA1911104480	0d 0h 49m	-	2019-11-26 16:33	2019-11-19	2021-05-18	Expired	
4	i500	AA1911104481	0d 5h 12m	-	2021-02-16 12:37	2019-11-21	2021-05-20	Expired	
5	i700	AZ2105102622	0d 8h 15m	2022-09-21 12:09	2022-09-15 11:25	2021-07-09	2022-07-08	Expired	Buy
6	i700w	BF2112100021	0d 7h 4m	2023-04-03 17:42	2023-03-07 17:29	-	-	-	Buy
7	i700w	BF2202100048	19152d 22h 15m	2023-04-03 18:30	2023-03-24 10:35	-	-	-	Buy
8	i600	BG2202100024	0d 5h 47m	2023-07-31 16:10	2023-06-26 13:43	2022-03-30	2023-03-29	Expired	Buy
9	i600	BG2202100026	0d 5h 40m	2022-09-05 16:34	2022-08-11 11:25	-	-	-	Buy
10	i600	BG2202100029	0d 3h 10m	2022-08-10 11:05	2022-06-16 11:58	-	-	-	Buy

① The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home Terms & Conditions Privacy Policy Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

قائمت أخرى

الإخطارات & التحديثات

يمكنك التحقق من الإخطارات الهامة من Medit وتحديثات برنامج Medit.

Notice & Update

Notice

NFT Service Termina...

2023-04-19

Notice

End of Support Notic...

2023-04-14

Update

Release Note for Me...

2023-03-29

Notice

[Medit] We've updat...

2023-03-29

Update

Release Note for Me...

2023-03-17

Update

Medit Occlusion Ana...

2023-03-08

Notice

NFT Service Termination Notice

2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

مواقع ذات صلة

يمكنك الحصول على معلومات مختلفة حول استخدام Medit Link. قم بالوصول إلى موارد Medit التعليمية والإعلامية، مثل Medit Academy و Medit Academy YouTube و مركز مساعدة Medit.

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

تنزيل تطبيق Medit Link

يمكنك تنزيل أحدث إصدار من مثبت البرنامج من الويب. هذه القائمة مفيدة عندما تفقد المثبت المتوفر في حزمة المنتج، أو إذا كان لديك مثبت قديم.

ملحوظة

يتم تحديث Medit Link تلقائيًا عندما تكون متصل بالإنترنت.

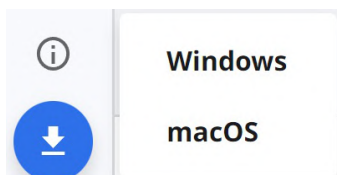

نظرة عامة

MEDIT Link 3.2.0

sdhc

1

3

2

4

Patient

Total Patients: 94

All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1. Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1. First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1. Alexa				0	2023-10-19	
1. Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1. Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1. Orange				0	2023-10-24	
1. Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	شريط العنوان	راجع تطبيق Medit Link < شريط العنوان للحصول على معلومات مفصلة.
2	القائمة	راجع تطبيق Medit Link < القائمة للحصول على معلومات مفصلة.
3	الأدوات والوظائف	راجع تطبيق Medit Link < عارض الملفات و تطبيق Medit Link < خيارات العرض للحصول على معلومات مفصلة.
4	قائمة الحالات	راجع تطبيق Medit Link < الفلتر والبحث للحصول على معلومات مفصلة.

يلخص الجدول أدناه القوائم المتوفرة في كل نوع من حسابات العيادات والمختبرات.

App Box	Trash Box	Case Talk	Work Box	In Box	Order Box	Case Box	Patient	نوع الحساب	
O	O	O	X	X	O	O	O	المشرف	حسابات العيادة
O	O ميزة* الاستعادة فقط	O	X	X	O	O	O	العضو	
O	O	O	O	O	X	X	X	مشرف	حسابات المختبر
O	O ميزة* الاستعادة فقط	O	O	O	X	X	X	عضو	

شريط العنوان

يوفر شريط العنوان وصولاً سريعاً إلى ميزات مثل معلومات الحساب، الإشعارات، الملاحظات والتحديثات، الإعدادات وحالة الشبكة.



My Information

تحتوي معلوماتي على معلومات المستخدم الأساسية مثل صورة الملف الشخصي، اسم العيادة أو المختبر، عنوان البريد الإلكتروني واسم المستخدم.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

Log Out

Close

الإشعارات

يمكنك رؤية الإشعارات المتعلقة بالشركات، الطلبات وإجراءات العمل.

Notification

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

Delivery
2020-08-20 오후 5:20

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

Order
2020-08-20 오후 5:18

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order
2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order
2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order
2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order
2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Work
2020-08-14 오후 6:33

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

Work
2020-08-14 오전 10:15

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

Close

1	حدد المربع لعرض الرسائل غير المقروءة فقط.
2	انقر على أي إشعار للانتقال على الفور إلى الحالة أو صفحة الويب ذات الصلة.

الإخطارات & التحديثات

يمكنك التحقق من الإخطارات الهامة من Medit وتحديثات برنامج Medit.

الإعدادات

يتيح مربع حوار الإعدادات للمستخدمين تكوين البرنامج.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI
 ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Please apply changes.

Apply

يرجى الرجوع إلى تطبيق Medit Link < الإعدادات للحصول على معلومات مفصلة حول خيارات الإعدادات.

حالة الشبكة

يمكنك Medit Link من استخدام جميع الميزات بسلاسة عند الاتصال بالشبكة.

لمساعدتك في التحقق من حالة اتصال الشبكة في الوقت الفعلي، يتم عرض أيقونة حالة الشبكة في شريط العنوان.

Network Status

Network speed is good.

Network speed is fast enough.

Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.

Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.

Synchronization is in progress. Some case lists may not match.

Synchronization failed. The case lists may not match.

☐ Work Offline

Close

إذا لم يكن اتصال الشبكة جيدًا، فقد تواجه القيود التالية:

- سيتم تقييد بعض الوظائف، مثل طلب حالة، إنشاء حالة، المشاركة عبر Case Talk وتزامن مع التخزين السحابي.
- يمكن تقليل الأداء العام للخدمة بسبب تأثير الشبكة.

في هذه الحالة، يمكنك الدخول إلى وضع عدم الاتصال لأداء المهام الأساسية ثم استخدام الميزات التي تتطلب الاتصال بالإنترنت بمجرد اتصالك.

ملحوظة

يشير رمز الشبكة إلى سرعة الاستجابة بين المنطقة الحالية و AWS (Amazon Web Service). لا يمثل ذلك سرعة الشبكة لديك، لذلك قد تظهر أحياناً الحالة على أنها رديئة أو سيئة، على الرغم من أن سرعة الشبكة لديك سريعة بدرجة كافية. إذا كانت العملية الأخرى تستخدم نفس الشبكة، فقد تظهر السرعة على أنها ضعيفة أو سيئة، وقد يكون الأداء العام لـ Medit Link سيئاً. في هذه الحالة، يرجى عدم مشاركة الشبكة مع العمليات الأخرى. على سبيل المثال، تُعد ميزة "تحميل البيانات الخام" تشكّل حملاً كبيراً على الشبكة. إذا أظهر الرمز حالة سيئة أو رديئة، فانقل إلى الإعدادات > تحميل البيانات الخام وقم بإيقاف تشغيل "التحميل تلقائياً".

يوفر خيارات لإعداد النظام بشكل عام.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI ☐ US

Notification

☒ Allow Notifications


Apply

Close

حدد مجلدًا لتخزين نتائج البيانات التي تم إنشاؤها في Medit Link والبرامج المتصلة.	حفظ المجلد
حدد مسار التثبيت لـ Medit Apps والتطبيقات الشريكة المتوفرة في الـ App Box.	مجلد تثبيت التطبيقات
حدد لغة البرنامج.	إعدادات اللغة
حدد نظام ترقيم الأسنان بين FDI و US.	ترقيم الأسنان
عند التحديد، ستتلقى إشعارات بتحديثات البرنامج.	إشعارات
عند التحديد، يتم تحميل البيانات الخام تلقائيًا إلى السحابة. يساعد هذا في خلق نسخة احتياطية من البيانات الأصلية وإجراء مسح سلس عند استخدام Medit Link مع نفس الحساب على جهاز كمبيوتر آخر. تنطبق النسخة الاحتياطية الأصلية للبيانات السحابية فقط على البيانات التي تم الحصول عليها في Medit Scan for Clinics.	تحميل البيانات الخام
اختر ما إذا كنت تريد أن تظهر مراحل المسح أدناه تلقائيًا في Medit Scan for Clinics دون الحاجة إلى ملء معلومات النموذج. - ما قبل العملية للفك العلوي - ما قبل العملية للفك السفلي - مسح ضوئي للوجه	مسح سريع
عند التحديد، يتم عرض النموذج ثلاثي الأبعاد في عرض أكثر حيوية وواقعية.	المعالجة المتقدمة
ضبط سطوع النموذج الثلاثي الأبعاد.	ضبط نسيج اللون
* قد تختلف الألوان الناتجة قليلاً عن Medit Link عندما تفتح نفس البيانات باستخدام برامج أخرى.	خيارات العرض
انضم إلى برنامج تحسين تجربة مستخدم Medit. - نستخدم المعلومات التي تم جمعها لتحسين منتجاتنا وخدماتنا. - لا نجمع أي معلومات تحدد هوية الأفراد.	برنامج تحسين تجربة مستخدم Medit
حدد القائمة الافتراضية التي سيتم عرضها عند بدء تشغيل البرنامج. - يمكن لحسابات العيادات الاختيار بين Patient و Case Box - يمكن لحسابات المختبرات الاختيار بين In Box و Work Box	الصفحة الافتراضية بعد تسجيل الدخول

ادارة التخزين

تحقق من مساحة التخزين المحلية ومساحة تخزين السحابة وقم بإدارتها.

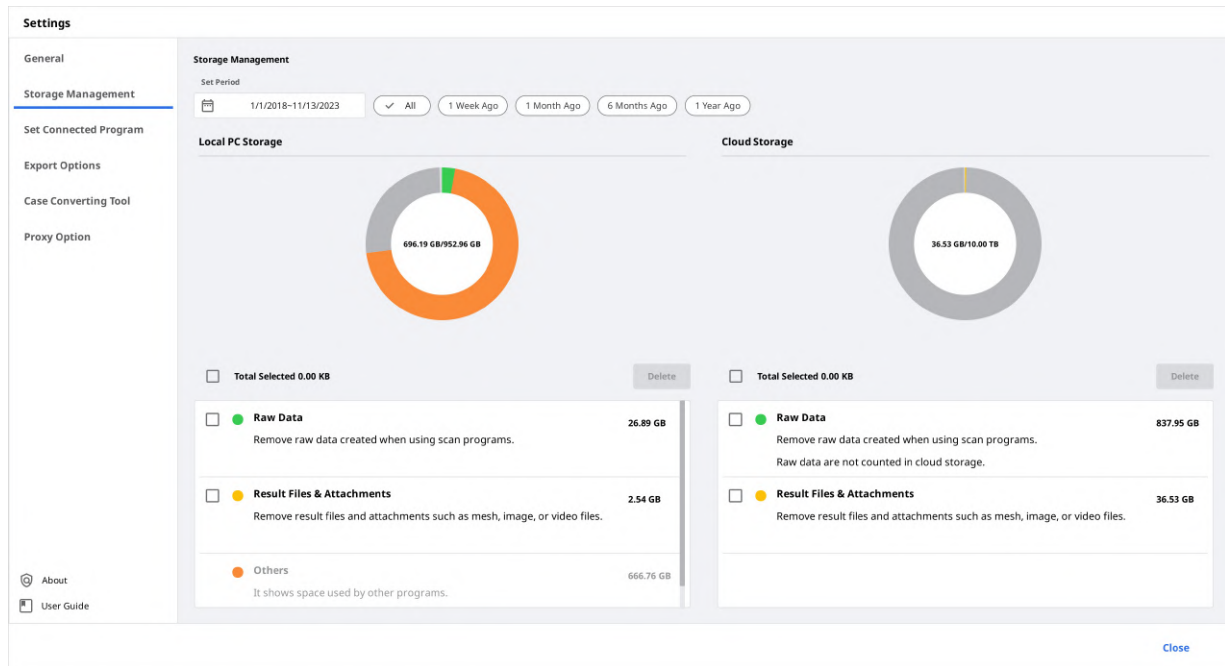

الفترة المحددة

قم بتحديد الفترة لحذف البيانات التي تم إنشاؤها خلال الإطار الزمني أدناه.

- الكل: رؤية كل الملفات.
- منذ أسبوع واحد: رؤية الملفات التي مَرَّ أسبوع على إنشائها.
- منذ شهر واحد: رؤية الملفات التي مَرَّ شهر على إنشائها.
- منذ 6 أشهر: رؤية الملفات التي مَرَّت ستة أشهر على إنشائها.
- منذ عام واحد: رؤية الملفات التي مَرَّ عام على إنشائها.

التخزين المحلي

قم بإدارة مساحة تخزين جهاز الكمبيوتر.

البيانات الخام	قم بإزالة البيانات الخام المحددة من جهاز الكمبيوتر. إذا تم تحميل البيانات الخام بالفعل إلى السحابة، يمكنك تنزيلها واستخدامها وقتما تشاء.
النتائج & المرفقات	إزالة ملفات النتائج والمرفقات من جهاز الكمبيوتر، مثل الشبكة والصور ومقاطع الفيديو. إذا تم تحميل هذه الملفات بالفعل إلى السحابة، يمكنك تنزيلها واستخدامها وقتما تشاء.
آخرون	عرض الملفات المستخدمة لتشغيل النظام والبرامج الأخرى. يظهر تخزين جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لا يمكنك إزالة هذه الملفات من Medit Link.
حذف	إزالة الملفات المحددة من جهاز الكمبيوتر.

التخزين السحابي

إدارة مساحة التخزين السحابي.

البيانات الخام	لا تشغل البيانات الأولية مساحة في التخزين السحابي، لذلك لن تكون في الدائرة البيانية. ولكن يمكنك إدارة البيانات الأولية من هنا إذا لزم الأمر، على سبيل المثال، حذفها لحماية معلومات المريض الخاصة، إلخ.
النتائج & المرفقات	تشغل ملفات النتائج والمرفقات مساحة في التخزين السحابي. إذا كانت السحابة ممتلئة، يمكنك تأمين المزيد من مساحة التخزين عن طريق إزالة الملفات غير الضرورية.
شراء تخزين	إذا كنت تستخدم خطة Standard، قم بالاشتراك في خطة Premium لتوسيع التخزين السحابي الخاص بك.
حذف	إزالة الملفات المحددة من التخزين السحابي لتحرير مساحة التخزين.

تحديد البرنامج المتصل

إدارة البرامج التي تدعم الدمج في Medit Link.

Settings

- General
- Storage Management
- Set Connected Program**
- Export Options
- Case Converting Tool
- Proxy Option
- About
- User Guide

Set Connected Program

Scan Program

☒ **Medit Scan for Clinics**

C:/ReleaseBuild/3.3.0.100_Release/Medit_Scan.exe

Apply

Close

يمكنك توصيل البرامج التالية:

حساب المختبر	حساب العيادة	برنامج المسح الضوئي
Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs	Medit Scan for Clinics	

ملحوظة

لا يتوفر دمج الخدمات التالية لـ Medit Link على Mac.

• Medit Scan for Labs

خيارات التصدير

اضبط كيفية تصدير الملفات من Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGarn_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting

☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.

☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

☒ Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply

Close

نوع CAD	حدد برنامج CAD الذي تريد استخدامه للتصميم. سيقوم البرنامج بضبط النتائج بناءً على اختيارك، مما يتيح لك متابعة التصميم دون أي محاذاة إضافية للمحور.
تصدير الملفات إلى	حدد المسار الذي تريد تخزين النتائج فيه.
صيغة الشبكة	حدد تنسيق ملف الشبكة النهائي.
تنسيق الصورة	حدد تنسيق ملفات الصور المصدرة.
الضغط & الجمع	ضغط الملفات: ضغط جميع النتائج في ملف واحد. دمج شبكة فردية: دمج جميع النتائج للفك العلوي أو الفك السفلي في ملف واحد. عند استخدام بعض البرامج التي لا يمكنها استيراد ملفات متعددة والعمل بها، يمكنك دمجها في برنامج واحد للعمل في تلك البرامج.
الخيارات عندما يكون نفس المجلد أو الملف موجودًا بالفعل.	اختر الإجراء الافتراضي لحالات وجود نفس اسم المجلد أو الملف في المسار الهدف. - اسأل دائمًا عند التصدير. - تصدير ملف جديد والكتابة فوق الملفات الموجودة. سيتم فقد الملف المخزن حالياً. - إنشاء مجلد وتصدير الملفات
قواعد اسم المجلد	حدد قواعد إنشاء اسم مجلد عند تصدير الملفات. سيتم تطبيق القواعد المحددة على تسمية المجلد، وسيتم حفظ الملف الذي تم تصديره في المجلد الذي تم إنشاؤه. يمكن استخدام المعلومات أدناه لتعيين القاعدة. - حساب العيادة - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف المريض، رقم تعريف الطلب - حساب المختبر - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف الطلب
قواعد اسم الملف	تحديد القواعد لاسم الملف الذي تم تصديره. يمكن استخدام المعلومات أدناه لتعيين القاعدة. - حساب العيادة - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف المريض، رقم تعريف الطلب - حساب المختبر - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف الطلب

60

أداة تحويل الحالة

يمكنك نقل الحالات بين الحسابات المختلفة عن طريق تصدير الحالات الموجودة بالحساب أو استيراد الحالات المصدرة من حسابات أخرى.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018-11/13/2023 All All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST1111의 케이스	TEST1111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST1111's Case	TEST1111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name
CaseBox_2023-11-13_15250

Export Files To
C:/Users/김영민/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From
C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_caries.meditex **Import**

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

تصدير الحالة

تصدير حالات الحساب الذي تم تسجيل الدخول إليه حاليًا إلى جهاز الكمبيوتر المحلي.

1. افتح Medit Link وانقر على أيقونة الإعدادات.

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education

Patient

+ New Patient + New Case

View Options

Total Patients: 3500 All All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

2. اختر "أداة تحويل الحالة" في القائمة على الجانب الأيسر.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018~11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name
CaseBox_2023-11-13_152111

Export Files To
C:/Users/김영민/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From
C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_cories.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

3. في قسم التصدير، قم بتعيين فترة أو ابحث عن حالات لتصديرها إذا لزم الأمر.

Export

1/1/2018~11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name
☐ TEST111의 케이스
☐ TEST111's Case
☐ Medit Ortho Simulation

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☒ Contains

☐ Equals

4. اختر الحالات التي تريد تصديرها من القائمة الموجودة في قسم "الملفات المراد تصديرها".

Export

1/1/2018~11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☒ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM

5. قم بتعيين اسم الملف عن طريق تعديل اسم الحالة في حقل اسم الملف.

6. قم بتعيين المجلد الوجهة لتصدير الحالات المختارة.

7. انقر على "تصدير".

8. انقر على "نعم" لفتح المجلد الذي تم تصدير الملف إليه.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. يتم حفظ الحالات المصدرة بتنسيق ملف .meditex.

إستيراد حالة

1. افتح Medit Link وانقر على أيقونة الإعدادات.

MEDIT Link 3.2.0 Medit Education

Patient

Total Patients: 3500

All / Contains

#	Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
	#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
	#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
	#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

2. اختر "أداة تحويل الحالة" في القائمة على الجانب الأيسر.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018-11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST1111의 케이스	TEST1111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST1111's Case	TEST1111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name

CaseBox_2023-11-13_152111

Export Files To

C:/Users/2288/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_carries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

3. في قسم الاستيراد، انقر على رمز المجلد لتصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحثًا عن ملف meditex الذي تريد استيراده.

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

4. انقر على الزر "استيراد" وتحقق من الملفات المراد استيرادها في القائمة أدناه.

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

5. ستظهر الحالة المستوردة أيضًا في Case Box (حساب العيادة) أو Work Box (حساب المختبر).

خيارات الوكيل

في الأماكن ذات الشبكة المحدودة، يمكنك تغيير إعدادات الشبكة.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme
☐ HTTP ☒ HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Close

حول

إظهار معلومات مفصلة حول Medit Link.

About

MEDIT Link

v 3.2.0 Build 178
Operation Korea
<https://www.medit.com/>
Copyright Medit Corp. All rights reserved.

[Terms & Conditions](#)
[Open Source License](#)

☒ Send Anonymous Usage Statistics



Close


دليل المستخدم

احصل على دليل المستخدم لـ Medit Link.

يتطلب فتح دليل المستخدم اتصالاً بالإنترنت.

Dashboard

يمكنك عرض الإحصائيات الخاصة بالعمل بأكمله على Medit Link في رسوم بيانية وجدول - في كل من تطبيق وموقع Medit Link.

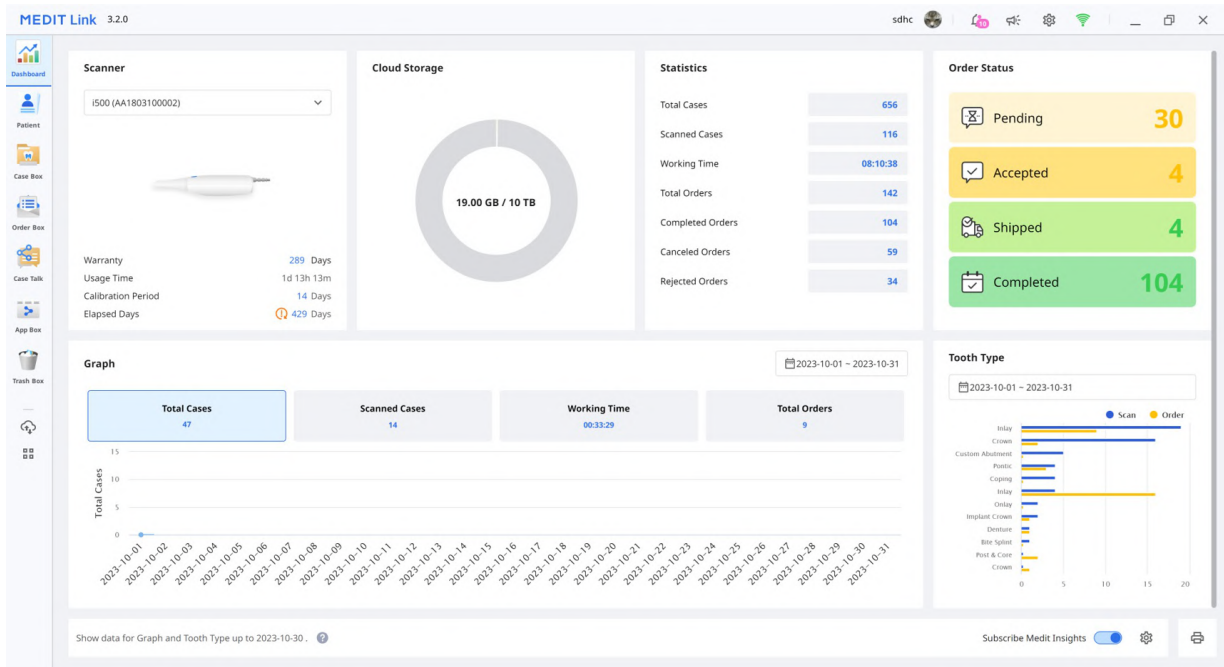

ملحوظة

يرجى الرجوع إلى [موقع Medit Link > Dashboard](#) لمزيد من المعلومات حول ال Dashboard و Medit Insights.

Patient

يمكنك إضافة المرضى، تعديلهم، حذفهم أو دمجهم في قائمة Patient.

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
KELLY				1	2021-07-02
Medit Sample				4	2023-11-05
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09
Michele Rinn				3	2021-04-26
newpatient				1	2022-10-13
ORG_Clinics[2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14
Order Test - Change Name				2	2023-07-24

إضافة مريض جديد

1. انقر على "مريض جديد".

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save

2. املأ المعلومات المطلوبة في مربع حوار "المريض الجديد"، ثم انقر على "حفظ".

حذف مريض

ملحوظة

يمكنك حذف مريض فقط في حالة عدم وجود حالات للمريض.

1. حدد المريض الذي تريد حذفه من القائمة.

MEDIT Link 3.2.0

Dr. Celeb

+ New Patient

+ New Case

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Case Review

Edit

Delete

Merge Patients

Selected Patients: 2

All

All / Contains

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
☐ Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
☒ Temporaries				0	2023-10-04	
☒ T.O.P	카피는	M	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. انقر على "حذف".

دمج مرضى

يمكنك دمج جميع حالات المرضى المتعددين في مريض واحد.

1. حدد المرضى الذين تريد دمجهم من القائمة.

MEDIT Link 3.2.0

Dr. Celeb

+ New Patient

+ New Case

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Case Review

Edit

Delete

Merge Patients

Selected Patients: 2

All

All / Contains

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
☐ Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
☒ Temporaries				0	2023-10-04	
☒ T.O.P	카피는	M	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. انقر على "دمج المرضى".
3. حدد المريض الهدف الذي ترغب في دمج جميع الحالات فيه.
4. يتم دمج جميع الحالات في المريض الهدف ويتم الاحتفاظ بمعلوماته الخاصة.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

[Cancel](#)
[Apply](#)

5. انقر على "تطبيق" لمباشرة الدمج.

Case Box/Work Box

MEDIT Link 3.2.0

wonhoon choi

Test Occlusion 's Case (Test Occlusion) 1

Form File Viewer 3

Scan Completed 4

6

Type Method Material Shade Favorites

Inlay Onlay Coping Denture Coping

Crown Pontic Post & Core Veneer

Implant Crown Custom Abutment Surgical Guide Offset Substructure

Custom Abutment + Implant Crown Custom Abutment + Coping Diagnostic Wax-Up Partial Denture

Type

7

Order List

No.	Type	Method	Material	Shade	
11	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
12	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
13	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	

Cancel Save

1	إظهار اسم الحالة واسم المريض.
2	توفير الميزات الرئيسية المتاحة: زر المسح الضوئي أو الفتح، زر الطلب، وأيقونات التطبيقات.
3	إظهار علامات التبويب المتاحة: النموذج، عارض الملفات
4	عرض وظائف لإدارة الحالات والملفات.
5	إظهار واجهة مستخدم تسجيل النموذج لبرنامج المسح المحدد.
6	توفير معلومات النوع/الطريقة / المادة/اللون للمستخدمين للاختيار لرقم السن المحدد.
7	عرض النوع/الطريقة/المادة/معلومات اللون المطبقة على الأسنان المختارة.

علامات التبويب في Case Box/Work Box

النموذج	عارض الملفات
توفر علامة تبويب النموذج واجهة مستخدم لإدخال المعلومات الأساسية للمسح الضوئي، مثل النوع والطريقة والمواد الخاصة بأرقام الأسنان وخيارات المسح. يتم تمرير المعلومات التي تدخلها إلى برنامج المسح الضوئي المتصل واستخدامها كمعلومات طلب عند تقديم طلب مع شريكك.	عرض ملفات النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة برامج المسح و CAD. يعرض عارض الملفات ويدير النماذج ثلاثية الأبعاد والصور ثنائية الأبعاد التي تم الحصول عليها أو المرفقة.

الوظائف في Case Box/Work Box

يتم توفير الوظائف التالية في Case Box/ Work Box.

إظهار حالة الحالة.	حالة الحالة	
توفير اختصارًا للحالة نفسها في box آخر (Case Box ↔ Order Box؛ In Box ↔ Work Box).	انتقل إلى Order Box/In Box	
راجع تفاصيل الحالة واحفظها كملف PDF أو اطبعها.	معلومات الحالة	
أضف مذكرة أو علامات عند التسجيل أو طلب حالة. استخدمها لتوصيل أي معلومات إضافية أو تكميلية عن الحالة لشركائك.	مذكرة & علامات	
يوفر معلومات مفصلة حول تاريخ الحالة.	تاريخ الحالة	
History Last Modified Date3/29/2022 1:57 PM Scanning Date4/12/2021 2:06 PM Creation Date3/22/2022 1:17 PM Case Size435MB Close		
حذف الحالة.	حذف	
لا يمكنك حذف الحالات المطلوبة أو الحالات التي تم إنشاؤها في وضع عدم الاتصال.		
إنشاء نسخة من الحالة الحالية في Case Box. يتم نسخ جميع البيانات إلى الحالة المستنسخة. تساعد هذه الميزة على تكرار معلومات العلاج لنفس المريض أو تقديم طلب إضافي بنفس المعلومات أو الملفات.	استنساخ	
إرفاق ملفات بتنسيقات مختلفة.	إرفاق	
تصدير ملفات المسح الضوئي أو نتائج CAD إلى جهاز الكمبيوتر المحلي. يمكنك اختيار تنسيق الملف المفضل لديك عند تصدير الملفات. يمكن استخدام الملفات المصدرة في برامج CAD و CAM لمزيد من العمل.	تصدير	
إنشاء رابط للمشاركة.		
يمكن للمستخدمين الذين لديهم الرابط المشارك الوصول إلى البيانات ثلاثية الأبعاد في متصفح مثل Chrome أو Firefox أو Safari دون تثبيت برامج إضافية. يمكنك مشاركة الرابط بحرية مع أي شخص أو أشخاص محددين فقط. يمكن تعيين رقم سري أو تاريخ انتهاء صلاحية الرابط لتأمين المعلومات الخاصة.	مشاركة	
انتقل إلى صفحة مركز مساعدة Medit لتقديم طلب الدعم.	إرسال طلب الدعم	

Order Box/In Box

1	عرض اسم الحالة واسم المريض.
2	توفير وظائف لإدارة الطلبات (القبول/الإلغاء ؛ التسليم/الاستلام).
3	إظهار علامات التبويب المتاحة: الطلب، عارض الملفات.
4	عرض وظائف لإدارة الحالات والملفات: حالة الحالة، الاختصارات للحصول على معلومات مفصلة، معلومات الحالة، المذكرة & العلامات، إلخ.
5	عرض المعلومات المفصلة للطلب بما في ذلك رقم الطلب، اسم المريض، اسم الشريك، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة & العلامات.
6	عرض معلومات المنتج المطلوب وحالة التسليم.

علامات التبويب في Order Box/In Box

الطلب	عارض الملفات
تحقق من المعلومات التفصيلية المتعلقة بالطلب، مثل رقم الطلب، اسم المريض، اسم الحساب، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة والعلامات.	تحقق من الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة عمليات المسح/CAD. يعرض عارض الملفات ويدير النماذج ثلاثية الأبعاد والصور ثنائية الأبعاد التي تم الحصول عليها أو المرفقة.

Case Talk

يمكن مشاركة الحالات التي تم إنشاؤها في Medit Link مع أشخاص محددين، أو أي شخص لديه الرابط المشترك أو الأعضاء المسجلين في Medit Link.

يمكن للمستخدم رؤية قائمة بجميع الحالات المشتركة من خلال Case Talk في تطبيق Medit Link وموقع Medit Link.

ملحوظة

تتطلب خدمة Case Talk اتصالاً بالإنترنت.

MEDIT Link 3.3.0

admin

Case Talk

2018-01-01 - 2024-04-23

Case Talk Name

Case Talk Name / Contains

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
2022_04_06_MEDIT NFT	hk****	27 36	-	2022-04-06 13:40	unlimited
seolah.jeon	hk****	11, 12, 13, 21, 22, 23	-	2022-04-01 11:48	unlimited
2.6.0.38 TEST 2's Case - Clone - Clone_2022-03-31 18:46:02	2.***** TE** 2	25, 26, 27, 33, 34, 35, 36	-	2022-03-31 18:46	unlimited

1

يمكن عرض الحالات المشتركة عبر مستعرض ويب دون تثبيت برنامج منفصل، مما يتيح سهولة الاتصال عبر البيانات ثلاثية الأبعاد على أجهزة مختلفة.

App Box

يوفر App Box العديد من البرامج الإضافية التي تكمل سير عمل المسح الضوئي الأساسي وتعزز الإنتاجية. يمكنك تنزيل التطبيقات المتوفرة وتثبيتها لإنشاء تركيبات، تحليل بيانات المسح، لنيل مساعدة أثناء الاستشارة، أو لتبسيط عملية عملك.

MEDIT Link 3.3.0

Clinic.02

App Box

All Medit Apps Downloaded

Search by App Information

Join the Medit Users Group on Facebook!

Connect with Experts, Learn Valuable Tips, and Elevate Your Skills

Join Now

Explore Medit Resources

News, tips, and expert insights on Digital Dentistry

Visit Now

All Management Imaging Diagnosis/Consultation CAD CAM Utilities Order Placement

Featured Apps

Medit DCM Converter

Convert 3Shape DCM files to Medit-compatible format

Update

Medit Smile Design

Simulation of teeth movement for orthodontic cases

Installed

Medit Ortho Simulation

Simulate the trajectory of teeth movement using Medit Ortho...

Install

Action Gate (ヨシダ・Yoshid...)

Comprehensive dental PMS

Install

Management

DentWeb(덴트웹) Integration

Comprehensive dental PMS

Install

EasyRx Integration

Universal orthodontic LMS

Install

Open Dental Integration

Quality software for dental offices

Install

iie systems connector

PRM specialized for orthodontics

Install

OneClick Integration App

Osstem's easy-to-use PMS

Install

i-Pro Integration

Comprehensive dental PMS

Install

LOGOSw Integration

Add a link between LOGOSw and Medit Link

Install

DentalCAD Integration

Allow to integrate Medit Link with DentalCAD.

Install

Action Gate (ヨシダ・Yoshid...)

Comprehensive dental PMS

Install

Andcom Integration

Convenient dental PMS

Install

الكل


يعرض التبويب "الكل" قائمة بجميع التطبيقات المقدمة بما في ذلك التطبيقات الأصلية التي طورها Medit (Medit Apps) والتطبيقات الشريكة، وهي تطبيقات تكامل مع شركاء Medit من مختلف قطاعات طب الأسنان الرقمي، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، برامج CAD/CAM، إلخ.

Medit Apps

يعرض التبويب "Medit Apps" فقط قائمة التطبيقات الأصلية التي تم تطويرها بواسطة Medit.

تم تنزيلها

يعرض التبويب "تم تنزيلها" قائمة بالتطبيقات المثبتة حاليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتطبيقات التي لها سجل تنزيل على حساب المستخدم.

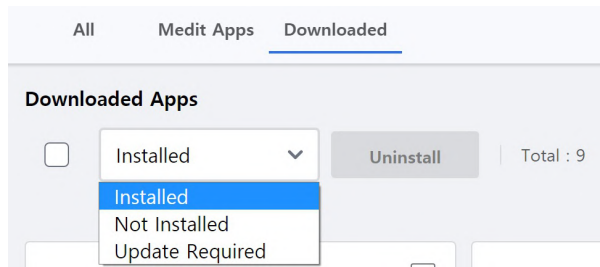

- مثبتة : يعرض هذا الخيار فقط التطبيقات المثبتة على جهاز الكمبيوتر الذي قام المستخدم بتسجيل الدخول إليه حاليًا.
- غير مثبتة : يتيح لك هذا الخيار رؤية التطبيقات التي قمت بتثبيتها على أجهزة الكمبيوتر الأخرى حتى تتمكن من تثبيتها بسرعة.
- التحديث مطلوب : يعرض هذا الخيار فقط التطبيقات المثبتة على جهاز الكمبيوتر الحالي والتي تحتاج إلى تحديث.

Trash Box

يخزن Trash Box مؤقتًا الحالات المحذوفة. يمكن استعادة أي حالة في Trash Box أو حذفها نهائيًا.

⚠ يرجى الحذر

سيتم حذف البيانات المحذوفة في Trash Box نهائيًا من جهاز الكمبيوتر والخادم ولا يمكن استعادتها.

MEDIT Link 3.2.0							
Trash Box							
☐	Restore	Selected Cases: 0		All / Contains			
Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size	
☐ Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB	
☐ Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB	
☐ Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB	
☐ Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB	
☐ Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB	
☐ Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB	
☐ Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB	
☐ Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB	
☐ CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB	
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB	
☐ Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB	
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB	
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB	

مدير مزانة الحالات

يساعدك مدير مزامنة الحالات على تحميل وتنزيل الحالات في Medit Link. يمكنك تحميل عدة حالات على السحابة أو تنزيلها على جهاز الكمبيوتر المحلي الخاص بك.

[illegible]

التحميل


إجمالي الحالات/الحالات المحددة	تحقق من عدد جميع الحالات أو المحددة، التي يجب تحميلها.
تحميل الكل	تحميل كل الحالات على السحابة.
إلغاء الكل	إلغاء جميع طلبات التحميل.
	تحميل الحالة على السحابة.
	إلغاء تحميل الحالة.
	محاولة تحميل الحالة مجدداً.

التنزيل

إجمالي الحالات/الحالات المختارة	تحقق من عدد جميع الحالات أو المحددة، التي يجب تنزيلها.
تنزيل الكل	تنزيل جميع الحالات على جهاز الكمبيوتر.
إلغاء الكل	إلغاء جميع طلبات التنزيل.
	تنزيل الحالة على جهاز الكمبيوتر.
	إلغاء تنزيل الحالة.
	أعد محاولة تنزيل الحالة.

مواقع ذات صلة

يمكنك الانتقال مباشرة إلى القوائم المتوفرة فقط على موقع Medit Link، مثل My Info، Partners و Membership. يرجى الرجوع إلى Medit Link > [Partners](#)، [Membership](#) و [My Info](#) للحصول على أوصاف مفصلة لقوائم موقع Medit Link. يمكنك الوصول إلى متجر Medit عبر الإنترنت، Medit Shop، حيث يمكنك شراء ضمانات ممتدة للماسحات الضوئية و سلع Medit الأخرى، مثل حقائب الظهر للماسحات الضوئية. يمكنك أيضًا الحصول على معلومات متنوعة حول استخدام Medit Link. يمكنك الوصول إلى موارد Medit التعليمية والإعلامية، مثل مركز مساعدة Medit Academy وقناة Medit Academy على YouTube ومنصة Medit Academy للتعليم عبر الإنترنت.

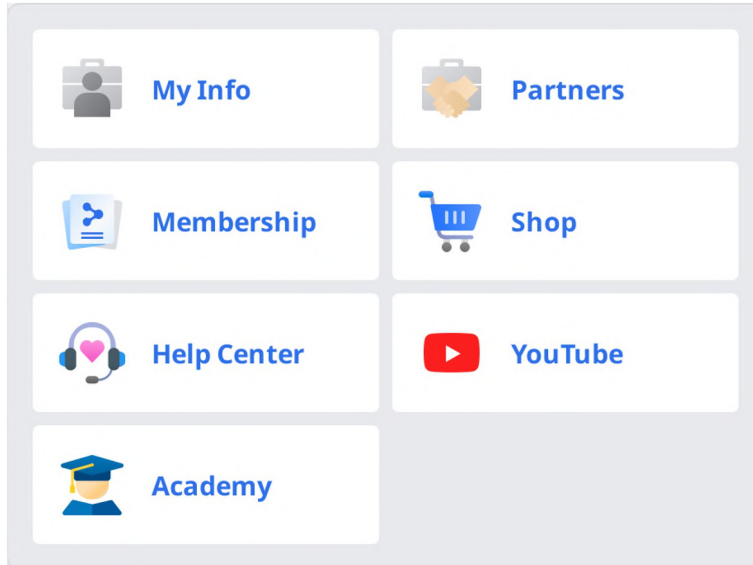

عارض الملفات

يقوم عارض الملفات بتجميع وعرض البيانات المختلفة، بما في ذلك البيانات المكتسبة من البرامج المرتبطة بـ Medit Link والبيانات المرفقة من قبل المستخدمين.

يوفر وظائف الإدارة الأساسية مثل إظهار/إخفاء البيانات وضبط العتامة وحذف البيانات.

يدعم معاينات الملفات بالتنسيقات التالية:

- البيانات ثلاثية الأبعاد: STL، OBJ، PLY
- الصور ثنائية الأبعاد: PNG، JPG، JPEG، BMP، GIF، TIF، TIFF
- ملفات الفيديو: MKV، MP4، AVI، WMV

شجرة البيانات

يمكنك جمع وعرض كافة البيانات الخاصة بالحالة في شجرة البيانات. يمكنك أيضًا إظهار/إخفاء البيانات وضبط الشفافية وحذف البيانات من شجرة البيانات.

يمكنك إظهار أو إخفاء البيانات.	إظهار/إخفاء	
يظهر شريط التمرير عند النقر على إحدى البيانات الموجودة في شجرة البيانات. يمكنك ضبط عتامة البيانات المعروضة عن طريق تحريك شريط التمرير.	العتامة	
يؤدي النقر على رمز المزيد إلى إظهار الميزات الإضافية المتاحة.	المزيد	
• إظهار هذا فقط: إخفاء جميع البيانات الأخرى ولكن عرض البيانات المقابلة فقط. • إخفاء: إخفاء البيانات. • نسخ: نسخ البيانات وإضافتها إلى مجموعة المرفقات. • تصدير: تصدير الملفات المحددة. • إعادة التسمية: تغيير اسم البيانات. • حذف: حذف البيانات.		

ملحوظة

يمكنك إعادة تسمية البيانات عند الاتصال بالإنترنت.

أدوات التحكم في النموذج

التحكم في النموذج ثلاثي الأبعاد

تحريك النموذج.	تحريك كامل	+
تدوير النموذج.	تدوير	↻
تكبير وتصغير النموذج.	التكبير/التصغير	⊕
وضع النموذج في وسط الشاشة.	التكبير مع الملاءمة	⊞
إظهار البيانات بألوان نسيج حقيقية.	النسيج مفعّل	🌈
إظهار البيانات بلون واحد.	النسيج غير مفعّل	🟠
عرض الشبكة في الخلفية.	الشبكة مفعلة	📏
تراكب الشبكة فوق النموذج.	تراكب مفعّل	📏
إخفاء الشبكة.	الشبكة غير مفعلة	📏
وضع عرض النموذج		
إعدادات الشبكة (mm)		

التحكم بالصور ثنائية الأبعاد


التنقل بين الصور.	الصورة التالية/السابقة	< >
تعديل الصورة.	تعديل	✎
يمكنك فصل نافذة الصورة وضبطها على الموضع المطلوب. يمكنك تغيير حجم النافذة. عند إعادة النافذة إلى موقعها الأصلي، تعود إلى حجمها الافتراضي.	قرص/لصق النافذة	📄

أدوات الوظائف

التقاط الصور والمذكرة


التقط الشاشة الحالية كصورة ثنائية الأبعاد أو ارسم عليها أو أضف ملاحظات.


يمكنك حفظها كملف مع ملاحظاتك وإرسالها كمرجع.

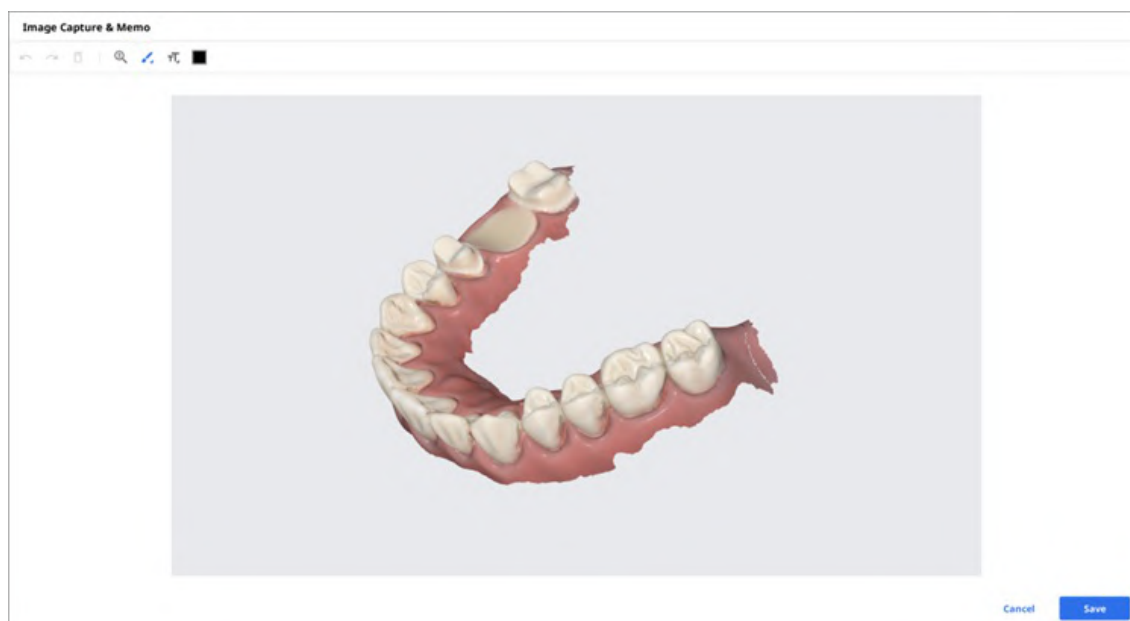

Ortho Capture

التقط الصور في اتجاه العرض الحالي وأعلى/أدنى/يسار/يمين من اتجاه العرض الحالي.

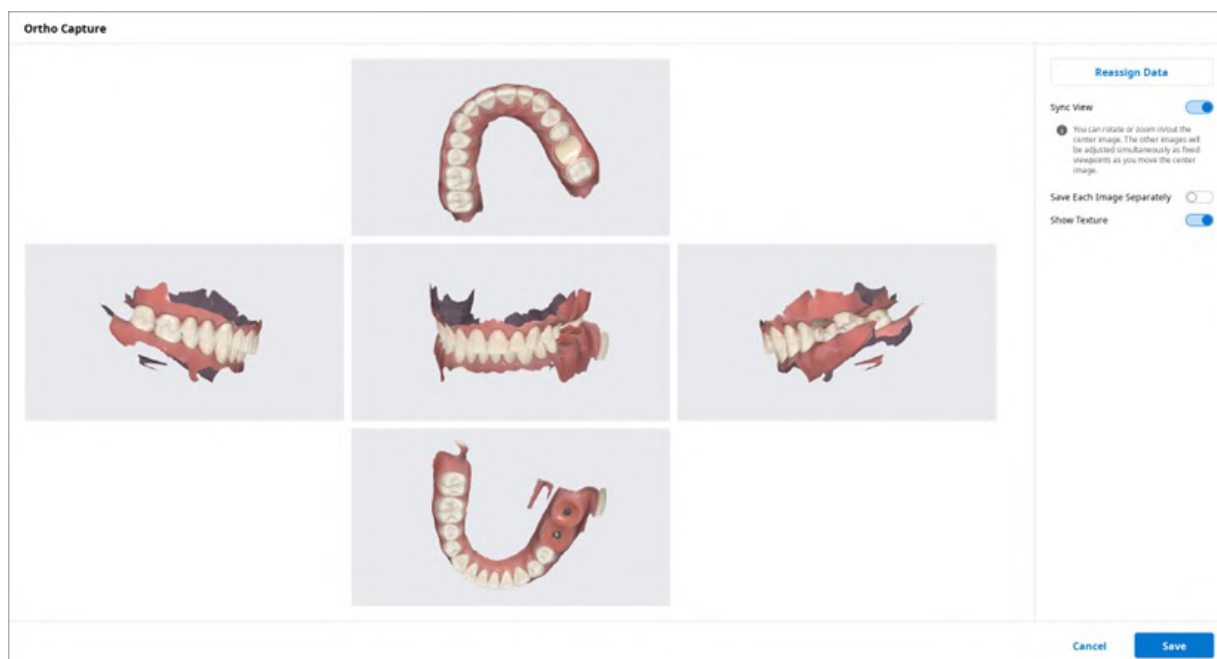

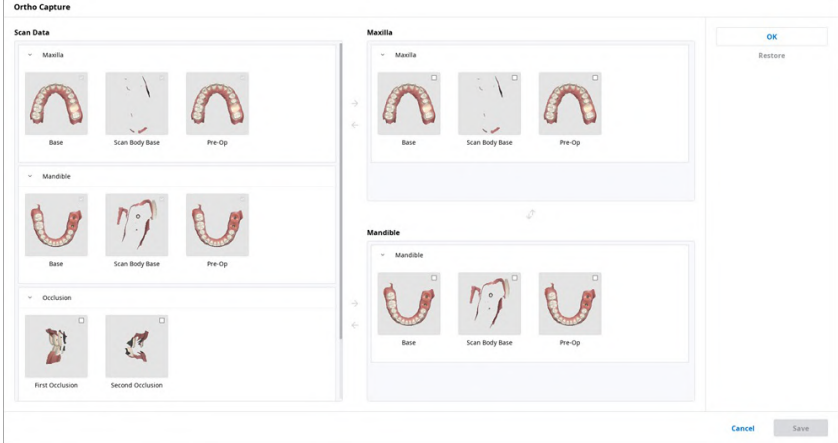عند التشغيل، يمكنك تدوير أو تكبير/تصغير الصورة المركزية. سيتم ضبط الصور الأخرى في نفس الوقت كنقاط رؤية ثابتة أثناء تحريك الصورة المركزية. عند إيقاف التشغيل، يمكنك تحريك جميع الصور أو تدويرها أو تكبيرها/تصغيرها بشكل فردي.	عرض المزامنة
احفظ كل صورة بدقة عالية.	حفظ كل صورة بشكل منفصل
قم بتفعيل/إيقاف تفعيل نسيج النموذج.	إظهار النسيج
قم بتغيير بيانات الفك العلوي/الفك السفلي باستخدام ميزة إعادة تعيين البيانات. يمكنك استخدام البيانات المغيرة لإنشاء واستخدام الصور الناتجة من Ortho Capture.  • مسح البيانات: يتم عرض بيانات المسح الضوئي للحالة. • الفك العلوي: يتم عرض البيانات التي حددتها للفك العلوي. • الفك السفلي: يتم عرض البيانات التي حددتها للفك السفلي.	إعادة تعيين البيانات


ملء الثقوب

ملء الثقوب في بيانات الشبكة ثلاثية الأبعاد.



القص


يوفر القص أدوات متنوعة لتعديل البيانات.

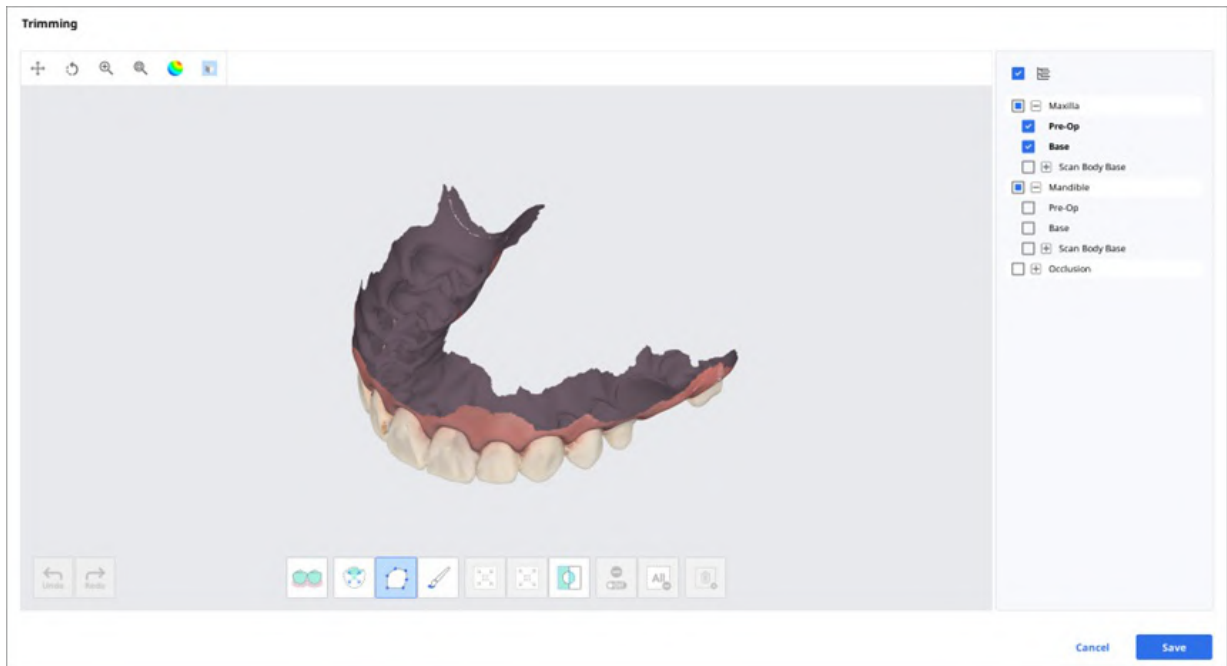

يمكن تعديل بيانات الشبكة ثلاثية الأبعاد المحددة باستخدام أدوات مختلفة موجودة في الجزء السفلي من النافذة.

لتحديد كل أسنان الفك تلقائيًا، تأرّك أجزاء اللثة. ملحوظة هذه الوظيفة متاحة فقط لبيانات المسح التي تم الحصول عليها باستخدام Medit Scan for Clinics مع تشغيل خيار "إستخدام الـ GPU".	التحديد الذكي للأسنان		الاختيار
	تحديد مساحة السن الواحد تلقائيًا بنقرة واحدة. يمكنك النقر أو السحب على السن.	التحديد الذكي للسن الواحد	
	حدد جميع الكيانات داخل شكل متعدد الخطوط مرسوم على الشاشة.	التحديد متعدد الخطوط	
	حدد جميع الكيانات على مسار مرسوم يدويًا على الشاشة. سيتم تحديد الوجه الأمامي فقط. تأتي الفرشاة بثلاثة أحجام مختلفة.	تحديد بالفرشاة	
تعديل المنطقة المختارة	قم بتقليل المنطقة المحددة في كل مرة تضغط فيها على الزر.	تقليل المنطقة المحددة	
	قم بتوسيع المنطقة المحددة في كل مرة تضغط فيها على الزر.	توسيع المنطقة المحددة	
	عكس التحديد.	عكس المنطقة المحددة	
إلغاء التحديد	عند التشغيل، قم بإلغاء تحديد المنطقة باستخدام أدوات مختلفة.	التحديد/إلغاء التحديد	
	إلغاء كافة المناطق المحددة.	إلغاء كل ما تم تحديده	
	حذف البيانات من المنطقة المحددة.	حذف المنطقة المحددة	

1. حدد المنطقة التي تريد قصها باستخدام أدوات تحديد المنطقة.

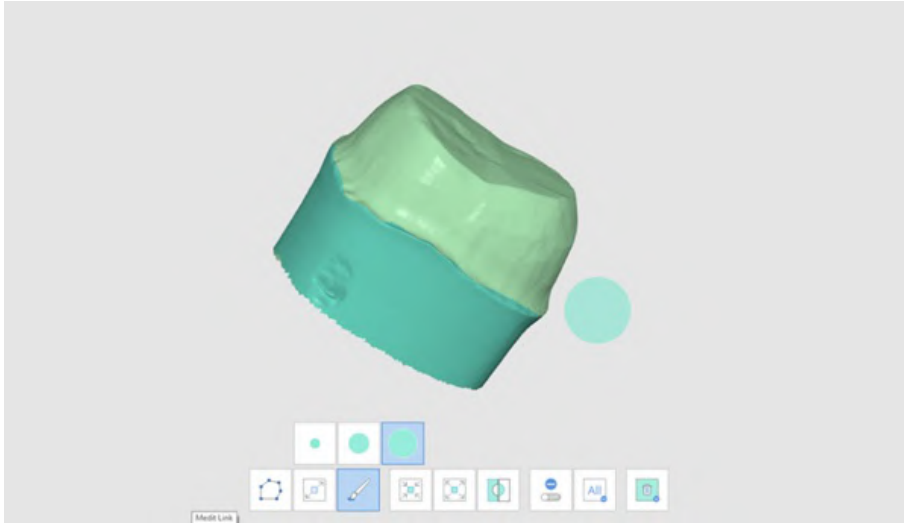


ملحوظة


تقوم أداة القص متعدد الخطوط بتحديد جميع الكيانات داخل شكل متعدد الخطوط مرسوم على الشاشة، بينما تقوم أداة القص بالفرشاة بتحديد بيانات الوجه الأمامي فقط.

2. يمكنك عكس التحديد أو تقليصه أو توسيعه باستخدام الأدوات الثلاثة التالية.


o عكس المنطقة المحددة

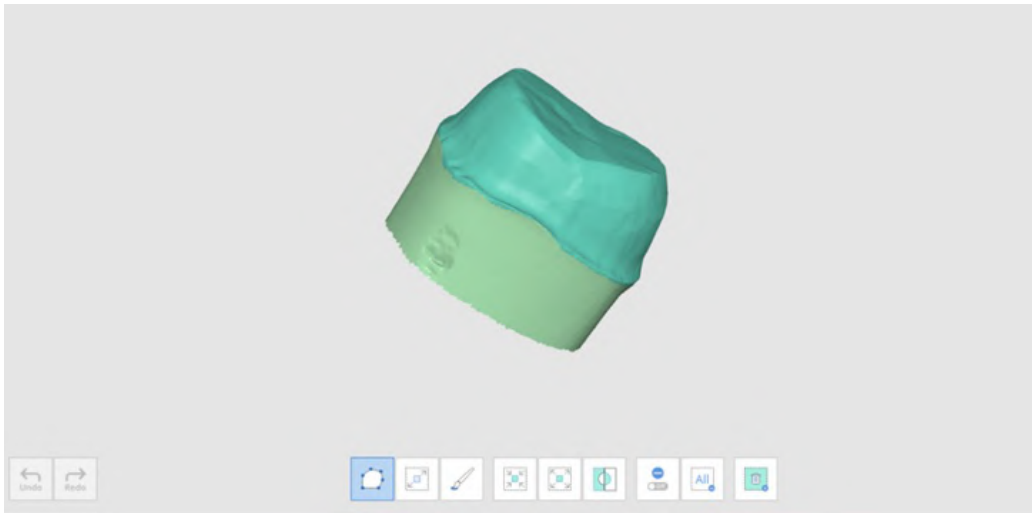

o تقليص المنطقة المحددة

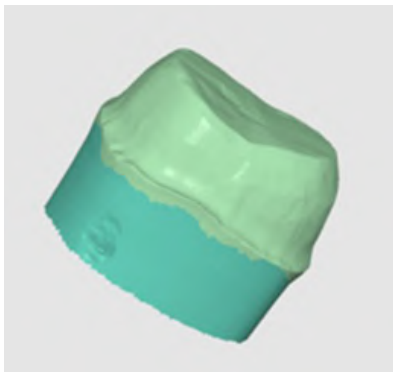


o توسيع المنطقة المحددة

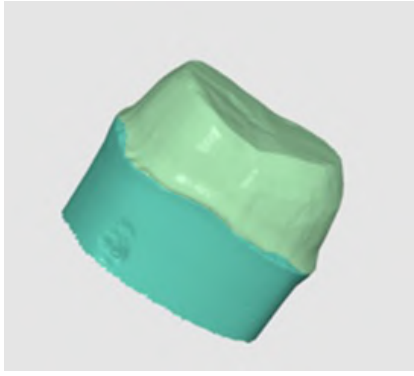




3. يمكنك إلغاء تحديد المناطق المحددة باستخدام أداة حذف المنطقة المحددة.

تحسين محاذاة الإطباق

تحسين محاذاة الإطباق. يمكنك اختيار البيانات الهدف وضبط محاذاة الإطباق.

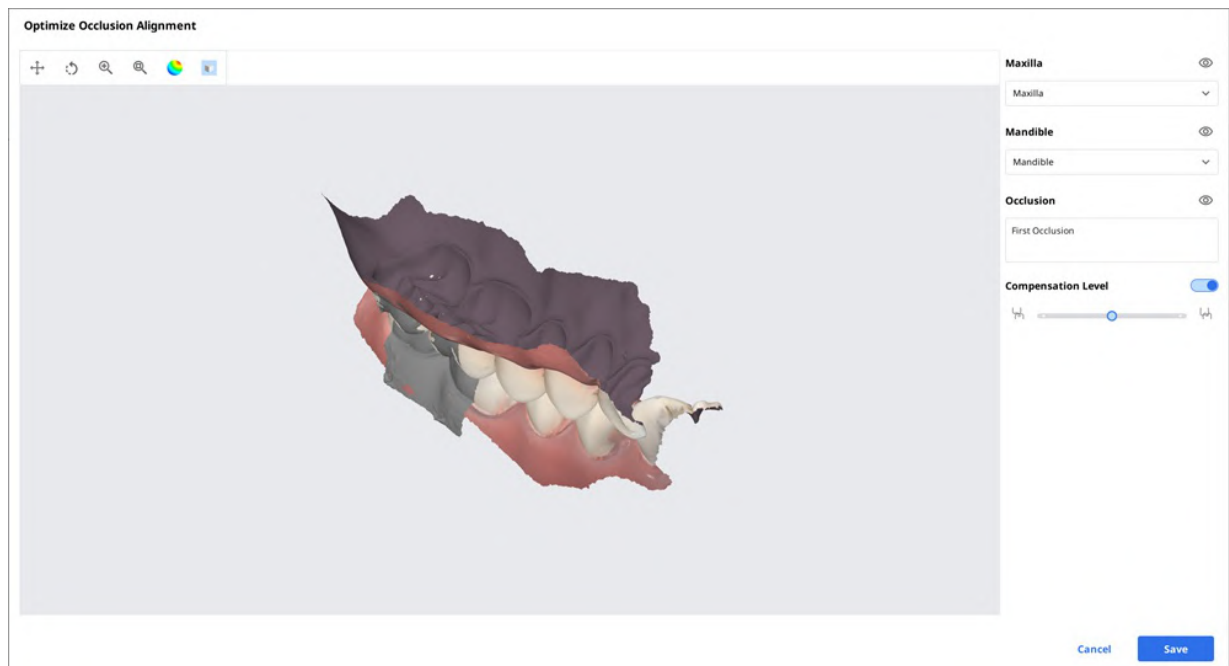


مستوى التعويض

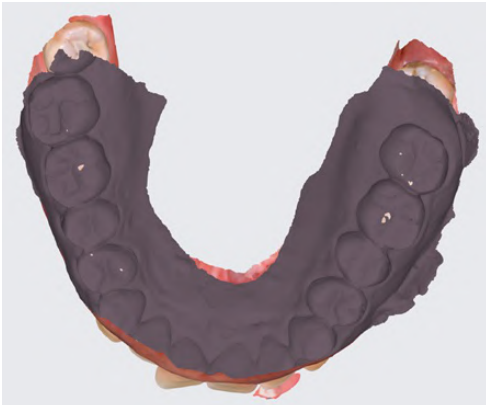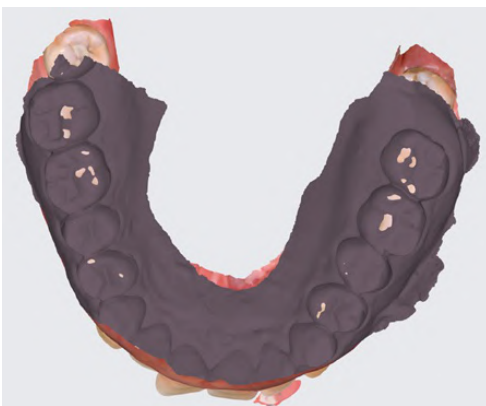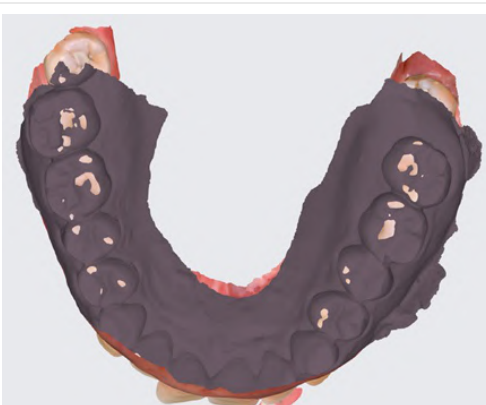		Compensation Level منخفض	
		Compensation Level متوسط	
		Compensation Level عالٍ	
		Compensation Level غير مفعّل	

حركة الفك السفلي

يمكنك تشغيل حركات الفك السفلي المسجلة في Medit Scan for Clinics لرؤية تلامست الإطباق الديناميكية بين الأسنان العلوية والسفلية.

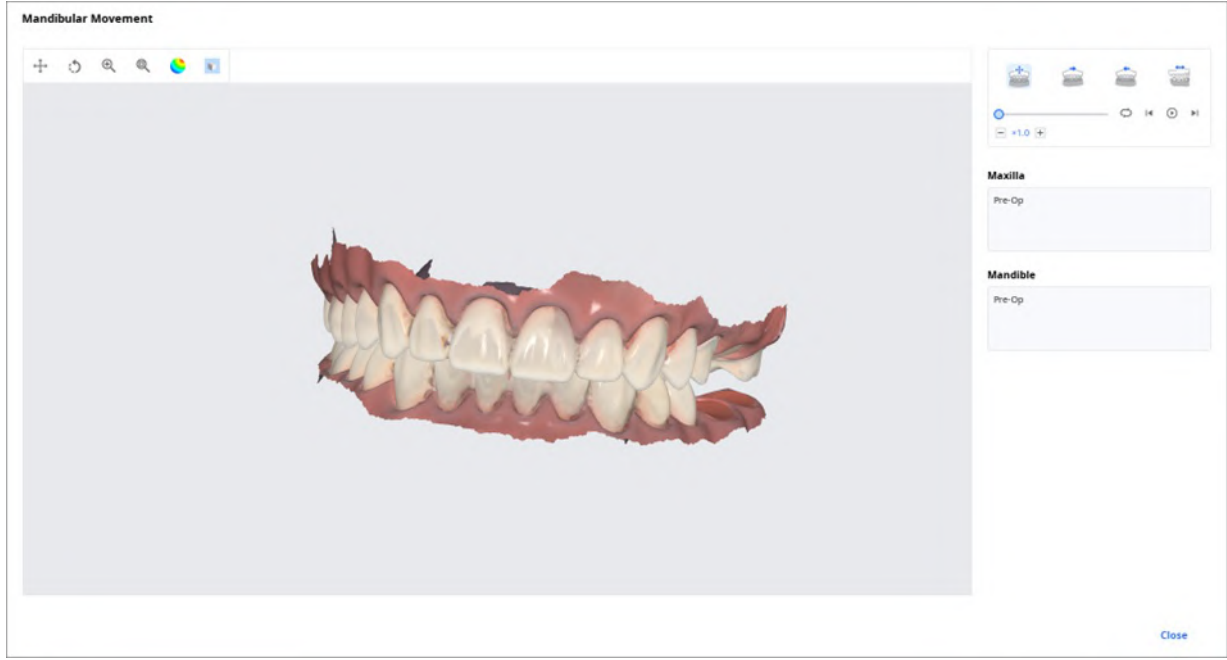

الحركة الحرة	تشغيل تسجيل حركة الفك السفلي الحرة.
الحركة الجانبية اليسرى	قم بتشغيل تسجيل الفك السفلي وهو يتحرك إلى اليسار.
الحركة الجانبية اليمنى	قم بتشغيل تسجيل الفك السفلي وهو يتحرك إلى اليمين.
الحركة التبارزية	قم بتشغيل تسجيل الفك وهو يتحرك إلى الأمام.

إدارة بيانات الإطباق المتعدد في عارض الملفات

يمكنك الحصول على نتائج متعددة لبيانات الإطباق من تطبيق Medit Scan.

يوفر Medit Link وظيفة لإدارة النتائج من خلال "عارض الملفات".

كيفية إدارة نتائج متعددة

عندما يحصل المستخدم على نتائج إطباق متعددة من Medit Scan for Clinics، يوفر Medit Link خيار تحديد نتيجة.

يتم سرد قائمة النتائج بالاسم، ويمكنك تحديد عنصر واحد.

سيظهر النموذج المحدد في "شجرة البيانات" و "منطقة عرض النموذج".



يمكنك طي القائمة وتغيير العنصر باستخدام رموز الأسهم.



Occlusal Relationship 1

< >

خيارات العرض

يمكنك تغيير خيارات العرض لتخصيص تخطيطات قائمة الحالات في Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

فلتر الحالة

إظهار أو إخفاء كل فلتر يمثل حالة الحالة. لا يتم عرض فلتر الحالة المخفية على الشاشة في Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

يمكنك بسهولة العثور على الحالة التي تحتاجها باستخدام فلتر الحالة.

- يمكنك النقر على الحالة التي تريد عرضها لعرض الحالات في تلك الحالة فقط.
- يمكنك تحديد حالات متعددة في وقت واحد.

تتوفر خيارات الفلتر التالية لكل box:

فلتر الحالة	Box
All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed	Case Box
All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed	Order Box
All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed	In Box
All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done	Work Box

عناصر الجدول

حدد العناصر المراد عرضها في قائمة الحالات في Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. يمكنك تغيير ترتيب عناصر الجدول أو ضبط عرض عمود الجدول في عرض القائمة لتحسين بيئة المستخدم.

تتوفر عناصر الجدول التالية لكل box:

عناصر الجدول	Box
اسم المريض / رقم تعريف المريض / الجنس / عدد الحالات / تاريخ التسجيل / تاريخ الولادة	Patient
الحالة / اسم الحالة / تاريخ الولادة / معلومات التسجيل / تاريخ اخر تحديث / تاريخ المسح / تاريخ الطلب / اسم المختبر	Case Box
الحالة / اسم الحالة / اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر / تاريخ التسليم المطلوب / تاريخ اخر تحديث	Order Box
الحالة / اسم الحالة / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب / تاريخ اخر تحديث / اسم العيادة	In Box
الحالة / اسم الحالة / اسم المريض / معلومات التسجيل / تاريخ اخر تحديث / تاريخ التسليم المطلوب / تاريخ المسح الضوئي / اسم العيادة / تاريخ الطلب	Work Box

نوع العرض

قم بتغيير نوع العرض بين العرض في صورة معرض والعرض في صورة قائمة في Case Box.

تتوفر خيارات نوع العرض التالية لكل box:

خيارات نوع العرض	Box
العرض في صورة قائمة	Patient
العرض في صورة قائمة / العرض في صورة المعرض	Case Box
العرض في صورة قائمة	Order Box
العرض في صورة قائمة	In Box
العرض في صورة قائمة	Work Box

التجميع

حدد خيار تجميع لتصنيف الحالات في القائمة وإعادة ترتيبها حسب الخيار المحدد.

لكل box، تتوفر خيارات التجميع التالية:

خيارات التجميع	Box
لا شيء / اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب	Case Box
لا شيء / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب	Order Box
لا شيء / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب	In Box
لا شيء / تاريخ التسليم المطلوب	Work Box

ملحوظة

لا تتوفر خيارات التجميع في Patient، Case Talk و Trash Box.

الفرز

حدد خيار الفرز لتغيير ترتيب الحالات في القائمة وفقاً للخيار المحدد.

لكل box، تتوفر خيارات الفرز التالية:

Box	التجميع	خيارات الفرز
Patient	-	اسم المريض / رقم تعريف المريض / تاريخ الولادة / تاريخ التسجيل / عدد الحالات
Case Box	لا شيء	اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر
	اسم المريض	تاريخ اخر تحديث / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر
	تاريخ المسح الضوئي	اسم المريض/تاريخ اخر تحديث/تاريخ الطلب/اسم المختبر
	تاريخ الطلب	اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / تاريخ المسح الضوئي / اسم المختبر
Order Box	لا شيء	اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب / اسم المختبر
	تاريخ المسح الضوئي	اسم المريض / تاريخ الطلب / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم المختبر
	تاريخ الطلب	اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ التسليم المطلوب / اسم المختبر
	تاريخ التوصيل المطلوب	اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر
In Box	لا شيء	اسم المريض / تاريخ الطلب / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم العيادة
	تاريخ الطلب	اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ التسليم المطلوب / اسم العيادة
	تاريخ التسليم المطلوب	اسم المريض / تاريخ الطلب / اسم العيادة
Work Box	لا شيء	اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم العيادة
	تاريخ التسليم المطلوب	اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / اسم العيادة

ملحوظة

لا تتوفر خيارات الفرز في Case Talk و Trash Box.

الفلتره والبحث

فلتره حسب المريض

فلتره وعرض الحالات حسب اسم المريض. يمكنك إنشاء قائمة عن طريق فلتره المرضى الذين تحتاج إلى العمل عليهم فقط.

MEDIT Link

Case Box Patient

☒ All ☐ Form Only ☐ Need Processing ☐ Scan Completed ☐ CAD ☐ Ordered ☐ Case Completed

1. أدخل اسم مريض.

Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. اختر المرضى من بين نتائج البحث أدناه.

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. يتم عرض حالات المرضى المختارين فقط في القائمة.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - + 2

Dashboard Patient Case Box Order Box Case Talk App Box Trash Box

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed View Options

Total Cases: 20 2018-01-01~2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오전 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

الفترة حسب التاريخ

قم بفلتر وعرض الحالات التي تم تعديلها خلال المدة المحددة.

1. انقر على فلتر المدة.

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. حدد المدة من القائمة.

- الكل: إظهار كل الحالات.
- النطاق المخصص: حدد تاريخي البدء والانتهاء لعرض الحالات التي تم تعديلها خلال الفترة.
- اليوم: اعرض الحالات التي تم تعديلها اليوم.
- أمس: اعرض الحالات التي تم تعديلها أمس.
- الأيام السبعة الماضية: اعرض الحالات التي تم تعديلها آخر مرة خلال السبعة أيام السابقة باستثناء اليوم.
- آخر 30 يوم: عرض الحالات التي تم تعديلها خلال آخر 30 يومًا باستثناء اليوم.
- هذا الشهر: عرض الحالات التي تم تعديلها آخر مرة خلال هذا الشهر.
- الشهر الماضي: عرض الحالات التي تم تعديلها خلال الشهر الماضي.

سيتم تحديث قائمة الحالات في الوقت الفعلي مع الحالات التي تم إنشاؤها أو آخر تعديل لها خلال المدة المحددة.

إمكانات البحث المتقدم

استفد من إمكانات البحث للعثور بسرعة على المعلومات التي تريدها.

All Search / Contains

تتوفر معايير البحث التالية لكل box:

الكل، اسم المريض، رقم تعريف المريض	Patient
الكل، اسم الحالة، اسم المريض، رقم تعريف المريض، معلومات التسجيل، اسم المختبر	Case Box
الكل، اسم الحالة، اسم المريض، رقم تعريف المريض، اسم المختبر، رقم تعريف الطلب	Order Box
الكل، اسم الحالة، اسم المريض، اسم العيادة،	In Box
الكل، اسم الحالة، اسم المريض، معلومات التسجيل، اسم العيادة، رقم تعريف الطلب	Work Box
اسم Case Talk (يحتوي)، اسم المريض (يساوي)	Case Talk
الكل، اسم الحالة، اسم المريض، اسم المختبر، حذف بواسطة	Trash Box (العيادة)
الكل، اسم الحالة، اسم المريض، اسم العيادة، حذف بواسطة	Trash Box (المختبر)

يمكنك تحديد معايير البحث والاختيار بين منطق "يحتوي" و "يساوي".

All
All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name


☒ Contains
☐ Equals

إنشاء / تعديل / استنساخ / حذف الحالات

إنشاء حالات

إنشاء حالات في Case Box (العيادة)

1. انقر على "حالة جديدة" في الزاوية اليمنى العليا.

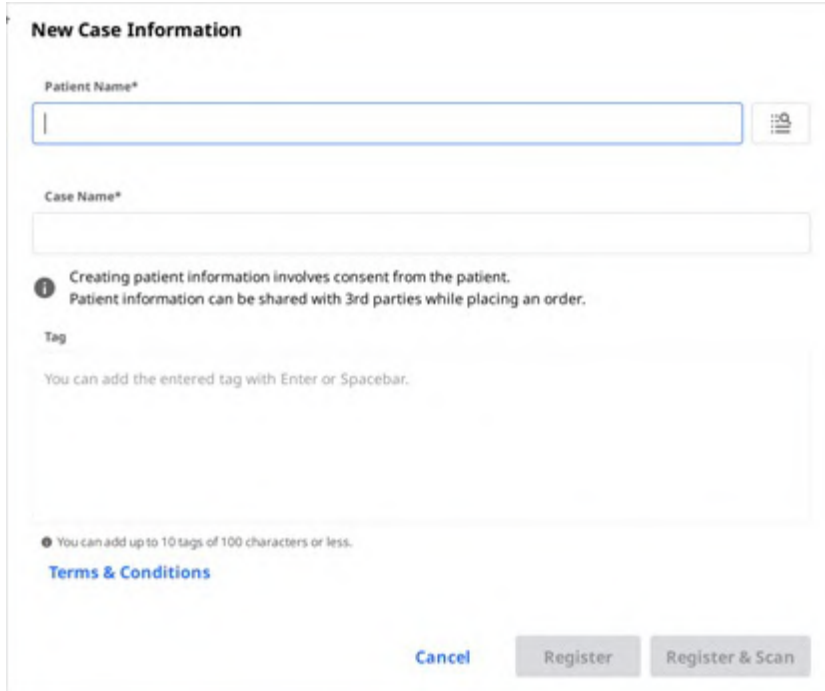


2. أدخل المعلومات الأساسية، مثل اسم المريض واسم الحالة.

- إذا أدخلت اسمًا غير موجود في قائمة المرضى، فسيتم إضافة مريض جديد.
- إذا قمت بإدخال اسم موجود في قائمة المرضى، يمكنك اختياره من القائمة.
- في حالة تسجيل حالة لمريض موجود، انقر على رمز قائمة المرضى لاختيار مريض موجود.



- في مربع حوار قائمة المرضى، يمكنك تسجيل مريض جديد أو تعديل معلومات مريض موجود.

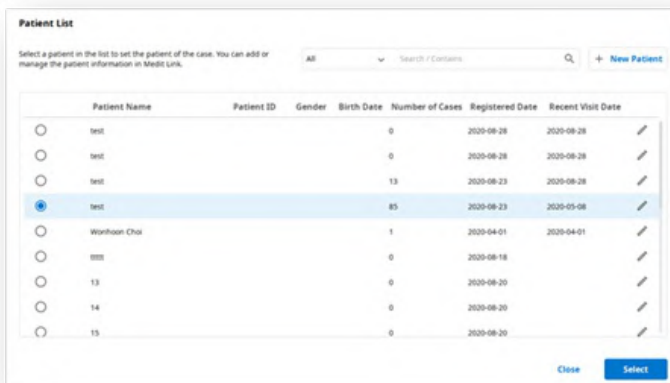

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Worham Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

3. سيتم ملء اسم الحالة تلقائيًا، ولكن سيظل بإمكانك تغييره.

4. انقر على "تسجيل & مسح" لإكمال تسجيل الحالة ومتابعة المسح.

- تسجيل: سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية. هذا مفيد عند تسجيل حالات متعددة.

- تسجيل & مسح: انتقل إلى تبويب النموذج لتسجيل معلومات النموذج للحالة.

إنشاء حالات في Work Box (المختبر)

1. انقر على "حالة جديدة" في الزاوية اليمنى العليا.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

2023-04-13

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Register

2. أدخل أو اختر اسم العيادة.
3. أدخل اسم المريض واسم الحالة. سيتم ملء اسم الحالة تلقائيًا، ولكن سيظل بإمكانك تغييره.
4. أدخل تاريخ التسليم المتوقع مع الأخذ في الاعتبار تاريخ انتهاء العمل.
5. بعد تسجيل الحالة، سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

تعديل الحالات

تعديل الحالات في Case Box (العيادة)

1. انقر فوق رمز "تعديل" بجوار اسم الحالة.

Edit Case Information

Patient Name*

Test Occlusion

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

mandibular movement - Clone - Clone

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Apply

2. انقر على "بحث" لتغيير اسم المريض. لاحظ أنه لا يمكن تعديله مباشرة؛ بدلاً من ذلك، يمكنك العثور على اسم المريض الذي ترغب في استبدال الاسم الحالي به ويمكنك تعديل معلومات المريض من القائمة.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

- تحقق من اسم المريض الذي تريد استبدال الاسم الحالي به.
- لإنشاء مريض جديد، اضغط على "مريض جديد".
- استخدم زر "تعديل" لتغيير المعلومات المسجلة عن المريض.
- انقر على "تطبيق" لإنهاء العملية.

تعديل الحالة في Work Box (المختبر)

- انقر على "تعديل" بجوار اسم الحالة.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. انقر على "تطبيق" بعد الانتهاء من التعديل.

ملحوظة

لا يمكنك تعديل معلومات الحالات التي تم استلامها من خلال الطلب في In Box.

استنساخ الحالات

استنساخ حالة في Case Box (العيادة)

1. انقر على رمز "استنساخ" في الأعلى.



2. سوف تُسأل عن نوع المعلومات التي ترغب في استنساخها في الحالة الجديدة.

Information

Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. اختر ما إذا كنت تريد نسخ معلومات النموذج فقط أو كل البيانات.

4. عند اكتمال الاستنساخ، سيتم إنشاء حالة باسم "[اسم الحالة] - استنساخ".

استنساخ حالة في Work Box (المختبر)

1. انقر على رمز "استنساخ" في الأعلى.



2. قم بتكرار جميع البيانات لإنشاء حالة جديدة.

3. عند اكتمال الاستنساخ، سيتم إنشاء حالة باسم "[اسم الحالة] - استنساخ".


حذف حالة

حذف حالة (العيادة والمختبر)

1. انقر على رمز "حذف".



2. انقر على "OK" لحذف الحالة.

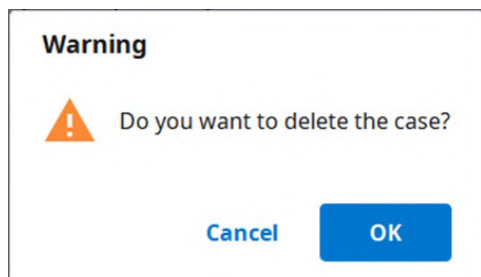

3. يتم نقل الحالات المحذوفة إلى Trash Box ويمكن استعادتها إذا لزم الأمر.

معلومات التسجيل

يمكنك إدخال معلومات النموذج بناءً على البرنامج المتصل ونوع العلاج. سيتم استخدام المعلومات التي تدخلها كمعلومات أساسية للعمل على المسح الضوئي أو برامج CAD والطلب.

تسجيل معلومات التسجيل في Case Box

الإدخال في تبويب النموذج

1. حدد ما إذا كنت ستدخل معلومات العلاج استناداً على الأسنان أو القوس.
2. حدد النوع - الطريقة - المادة - اللون.
 - إذا أدخلت المعلومات بشكل غير صحيح، يمكنك الرجوع لتحديدها مرة أخرى.
 - يتم تسجيل المعلومات المحددة تلقائياً في قائمة الطلبات.
3. انقر فوق "حفظ" لحفظ التسجيل الخاص بك.

تسجيل معلومات التسجيل في Work Box

الإدخال في تبويب النموذج


1. حدد برنامج المسح الذي تريد استخدامه.
2. حدد إحدى الخيارات التالية التي ستحدد استراتيجية المسح الخاصة بك: أسنان / Multi-Die / مرن / Multi-Die.
3. قد تختلف الطرق وفقاً لبرنامج المسح المحدد.

Medit Scan for Labs	Medit Scan for Clinics	
O	O	الأسنان
O	O	القوس
O	X	Multi-Die مرن
O	X	Multi-Die

4. حدد أرقام الأسنان، القوس أو القالب لعملية المسح.
5. حدد النوع - الطريقة - المادة - اللون.
 - إذا أدخلت المعلومات بشكل غير صحيح، يمكنك الرجوع لتحديدها مرة أخرى.
 - يتم تسجيل المعلومات المحددة تلقائياً في القائمة.
6. انقر فوق "حفظ" لحفظ التسجيل الخاص بك.

توصيل الأسنان بجسر

يمكنك توصيل عدة أسنان بجسر عند تطبيق نفس المادة على عدة أسنان متجاورة. انقر على رمز الجسر بجانب الأسنان المحددة لتوصيلها أو فصلها.

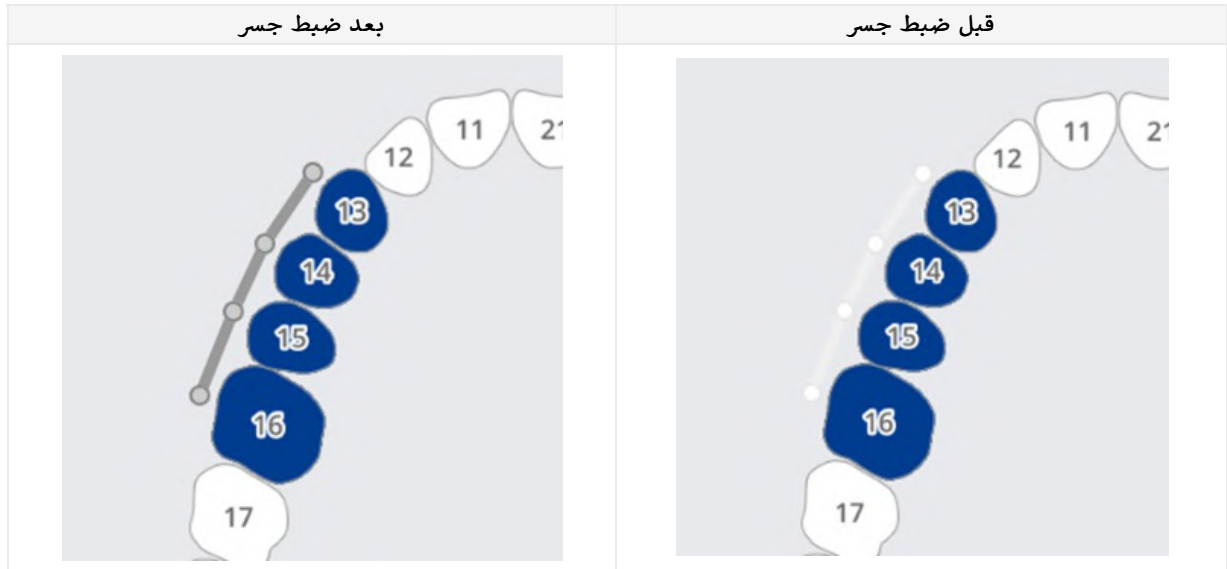

ضبط خيارات المسح

اعتمادًا على البرنامج الذي تعمل به، يتم توفير خيارات مسح مختلفة.

يتم تمرير خيارات المسح المحددة لكل برنامج مسح ضوئي.

Medit Scan for Labs

خيارات عامة

قم بتمريك الأسنان المحضرة والمجاورة وقم بتمرير هذه المعلومات إلى برنامج المسح.	الأسنان المجاورة	
قم بتعليم المقابل تلقائيًا وتمرير هذه المعلومات إلى برنامج المسح.	المقابل	
قم بعرض خيارات تحديد المفصلة في برنامج المسح.	المفصلة	
اسمح باستخدام استراتيجية المسح "حركة الفك" في برنامج المسح.	دليل الحركة	

خيارات بالأسنان

اسمح بتعيين استراتيجية لمسح دلائل الزرعات في برنامج المسح.	دليل الزرعة	
اسمح بتعيين إستراتيجية لمسح نموذج ما قبل العملية في برنامج المسح.	مسح ما قبل العملية	
اسمح بوضع استراتيجية لمسح النماذج الشمعية في برنامج المسح.	مسح النموذج الشمعي	

الإضافة إلى المفضلات

يمكنك تحديد منتج سريعًا عن طريق تسجيله كمنتج مفضل.

تتم إدارة قائمة المفضلات المسجلة كقالب ويمكن مشاركتها من خلال ميزات التصدير والاستيراد.

الإضافة إلى المفضلات

1. حدد رقم السن.
2. حدد النوع - الطريقة - المادة - اللون.

o يمكن تسجيل النوع - الطريقة - المادة - اللون كمفضلة حتى إذا لم يتم تحديد جميعها.

3. انقر على رمز "النجمة".



4. توجد مجموعة من المعلومات المحددة، باستثناء رقم السن، في قائمة البحث عن المفضلات.

إدارة القوالب المفضلة

يمكنك تسجيل أنواع مختلفة من القوالب وإدارتها ومشاركتها.

أضف	أضف قالبًا جديدًا.
إعادة تسمية	أعد تسمية القالب الحالي.
الحذف	احذف القالب الحالي.
تصدير	تصدير القالب الحالي إلى ملف.
إستيراد	إستيراد ملف قالب.

العمل على المسح/CAD

عملية المسح

بناءً على المعلومات التي تم إدخالها، يمكنك متابعة المسح.

1. أدخل/احفظ معلومات العلاج وحدد خيارات المسح اللازمة.
2. انقر على "مسح" في الزاوية العلوية اليمنى من النافذة.

عملية CAD

يوفر Medit Link تطبيق الاندماج DentalCAD لربط Medit Link إلى DentalCAD.

1. قم بتثبيت تطبيق DentalCAD Integration في الـ App Box.
2. انتقل إلى تفاصيل الحالة وانقر على أيقونة تطبيق DentalCAD Integration في المشغل السريع.
3. حدد تطبيق DentalCAD المثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسار في مربع الحوار المنبثق.
4. أدخل تفاصيل الحالة الممسوحة ضوئيًا وانقر على أيقونة تطبيق DentalCAD Integration، وسيؤدي هذا إلى انبثاق مربع حوار لإنشاء ملف dentalProject.
5. قم بتسجيل معلومات النموذج لبرنامج DentalCAD وانقر ugn "فتح" لفتح برنامج CAD.
6. إذا قمت بتثبيت تطبيق DentalDB Integration، فسيتم إرسال نتائج الـ CAD تلقائيًا إلى مسار الحفظ المحدد في exocad. (حسابات المختبرات فقط)


الاستفادة من التطبيقات الإضافية

مُضاف المشغل السريع

يمكنك تشغيل العديد من التطبيقات الإضافية مباشرة من خلال النقر على أيقونات التطبيقات المثبتة في المشغل السريع. يمكنك تغيير ترتيب أيقونات التطبيقات عن طريق سحبها.



إدارة مشغل التطبيقات

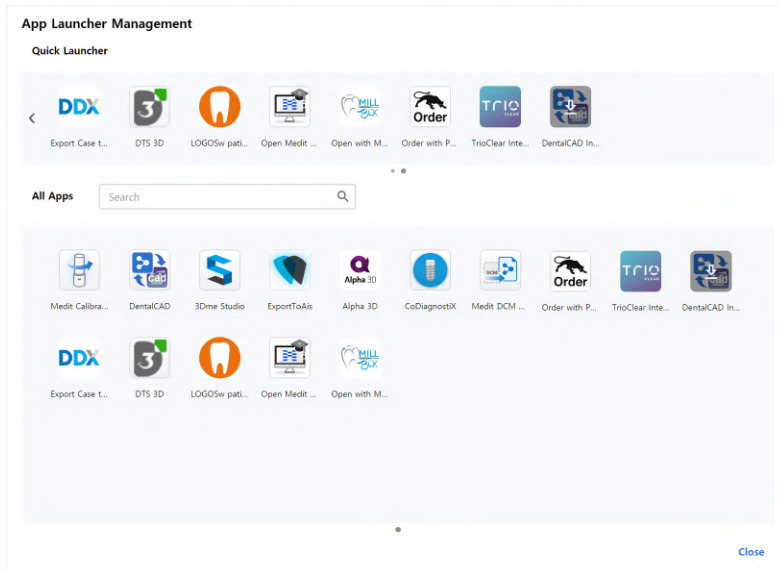

المشغل السريع

يمكنك تحديد التطبيقات التي تظهر في المشغل السريع. يمكنك تغيير ترتيب أيقونات التطبيقات عن طريق سحبها، أو يمكنك إنشاء مجلدات لتجميع التطبيقات المتشابهة معًا لتنظيمها.

كل التطبيقات

يتم عرض جميع التطبيقات التي قمت بتثبيتها. يمكنك النقر بزر الفأرة الأيمن على أيقونة التطبيق لإضافة التطبيق إلى المشغل السريع. من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن على القائمة، يمكنك أيضًا اختيار تشغيل التطبيق، تثبيته أو إلغاء تثبيته.

الحصول على ملفات النتائج

تصدير ملفات نتائج المسح

بالإضافة إلى مشاركة النتائج مع الشركاء من خلال الطلبات، يتيح لك Medit Link تخزين ملفات النتائج الخاصة بك بتنسيق الملف المطلوب باستخدام وظيفة التصدير.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close

Export

تصدير الملفات إلى	حدد المسار الذي تريد تخزين ملفات النتائج فيه.
إسم المجلد	يقوم النظام بإنشاء مجلد جديد ويقوم بتخزين جميع ملفات النتائج فيه. يتم تعيين اسم المجلد الافتراضي بواسطة قاعدة التسمية. ولكن يمكنك تغيير اسم المجلد مباشرة. يمكنك تحديد قاعدة التسمية في الإعدادات < خيارات التصدير > قواعد اسم المجلد.
اسم الملف	قم بتعيين اسم الملف للنتيجة. تحدد قاعدة التسمية اسم الملف الافتراضي. ولكن يمكنك تغيير اسم الملف مباشرة. يمكنك تحديد قاعدة التسمية من خلال الإعدادات < خيارات التصدير > قواعد اسم الملف
النوع	اختر برنامج التصميم الذي تريد استخدامه. سيعمل Medit Link على ضبط الملفات تلقائيًا وفقًا لاختيارك، مما يتيح لك متابعة التصميم دون الحاجة إلى محاذاة إضافية للمحور.
صيغة الشبكة	حدد تنسيق ملف الشبكة.
صيغة الصورة	حدد تنسيق ملفات الصور المصدرة.
ضغط الملفات	اضغط جميع النتائج في ملف واحد.
جمع الشبكات الفردية	اجمع بين نتيجة الفك العلوي أو الفك السفلي مع الأسنان الفردية. يكون ذلك مفيدًا عندما يكون استيراد عدة ملفات إلى برنامج غير ممكن.
تصدير كافة العلاقات الإطباقية	عندما يتم إنشاء نتائج إطباق متعددة من خلال تطبيق المسح، يمكنك تصدير جميع نتائج الإطباق بمرة واحدة.
حفظ معلومات الحالة كملف PDF	احفظ معلومات الحالة بصيغة PDF مع النتيجة.


تصدير ملفات النتائج من قائمة الحالات

يمكنك تصدير ملفات النتائج لحالة أو حالات متعددة في وقت واحد باستخدام خيار "تصدير" الموجود أعلى قائمة الحالات في Case Box و Work Box.

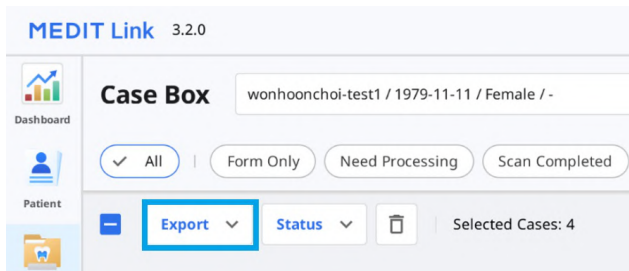

1. انتقل إلى Case Box أو Work Box.

2. حدد جميع الحالات التي تريد تصدير ملفات النتائج منها من القائمة.

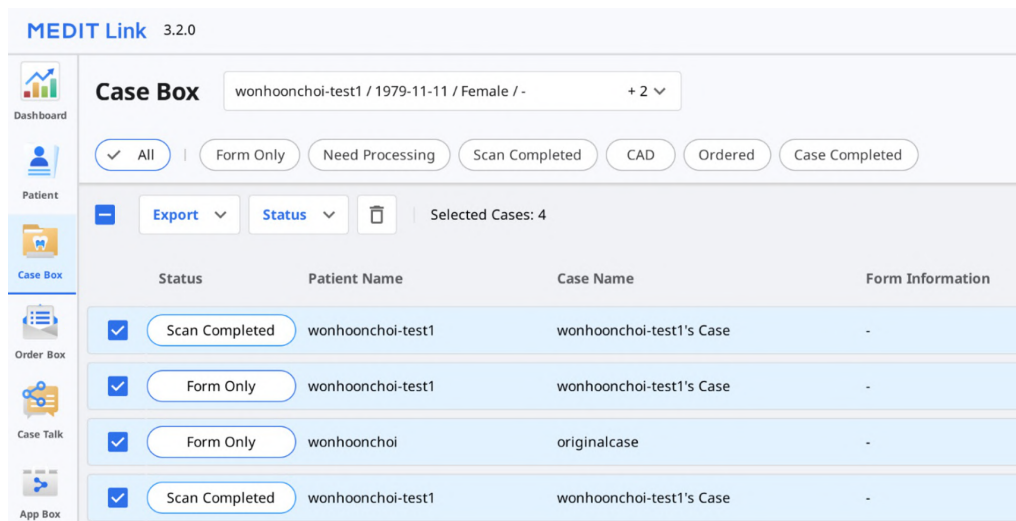

3. انقر على "تصدير" واختر "ملفات النتائج".

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. قم بتعيين المجلد الوجهة، نوع الملف، تنسيق الشبكة، وتنسيق الصورة، وحدد خيارات التصدير في تبويب "الخيارات".

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type
Medit

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close Export

ملحوظة

لا يمكن تعديل حقل "اسم المجلد" و"اسم الملف" عند تصدير الملفات لحالات متعددة. يتم إنشاء اسم المجلد واسم الملف تلقائيًا وفقًا للقواعد التي قمت بتعيينها لـ "قاعدة اسم المجلد" و"قاعدة اسم الملف" في الإعدادات > خيارات التصدير.

5. انقر على "تصدير".

6. انقر على "نعم" لفتح المجلد الذي تم حفظ الملفات فيه.


Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

تصدير ملفات النتائج من عارض الملفات

يمكنك تصدير ملفات نتائج المسح لحالة باستخدام أيقونة "تصدير" في الزاوية اليمنى العليا من تبويب "عارض الملفات".

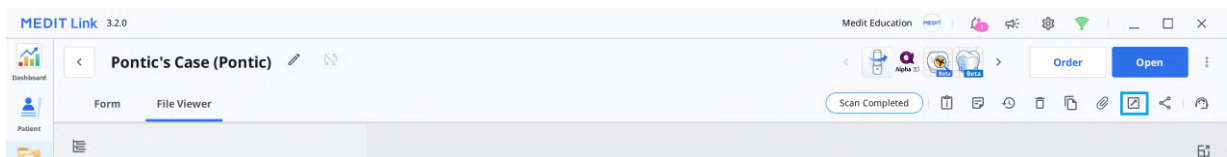

1. انتقل إلى Case Box أو Work Box.

2. انقر لفتح حالة من القائمة.

3. انقر على أيقونة "تصدير" في الزاوية اليمنى العليا من تبويب "عارض الملفات".



4. قم بتعيين المجلد الوجهة، اسم المجلد، اسم الملف، نوع الملف، تنسيق الشبكة، وتنسيق الصورة، وحدد خيارات التصدير في تبويب "الخيارات".

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

5. في تبويب "قائمة الملفات"، يمكنك تحديد الملفات المطلوبة للحالة عن طريق إلغاء تحديد الملفات غير الضرورية.

Export Files in This Case

Options **File List**

☒ [Icon]

☒ Maxilla
☒ Base

☒ Mandible
☒ Base

☒ Occlusion
☒ First Occlusion
☒ Second Occlusion

☒ Dynamic Occlusion
☒ Free
☒ Maxilla
☒ Mandible

☒ Face Scan Data
☒ Face Scan Data

[Close](#) [Export](#)

6. انقر على "تصدير".


7. انقر على "نعم" لفتح المجلد الذي تم حفظ الملفات فيه.

Question

 Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

تصدير ملفات النتائج من شجرة البيانات

يمكنك تصدير ملف أو ملفات إلى مجموعة بيانات معينة من القائمة الموسعة في عارض الملفات.

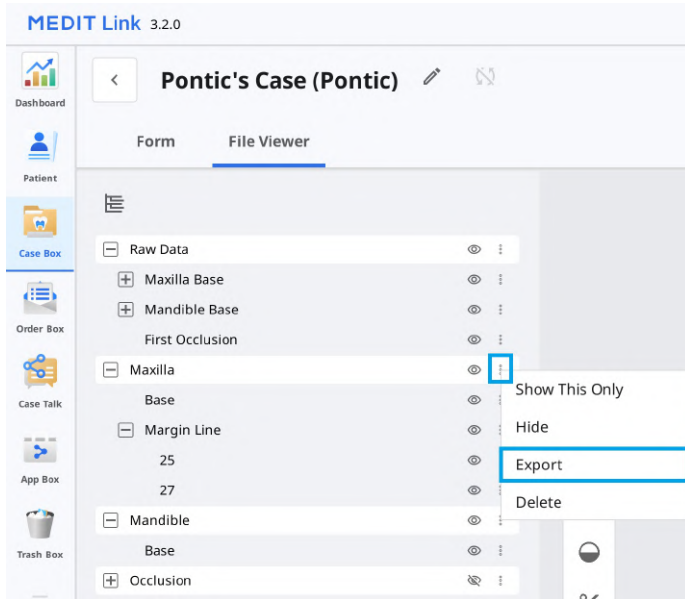


1. انتقل إلى Case Box أو Work Box.

2. انقر لفتح حالة من القائمة.

3. انقر على أيقونة النقاط الثلاث بجوار مجموعة البيانات أو على كيان في شجرة البيانات في تبويب عارض الملفات.

...

4. ثم انقر على "تصدير".

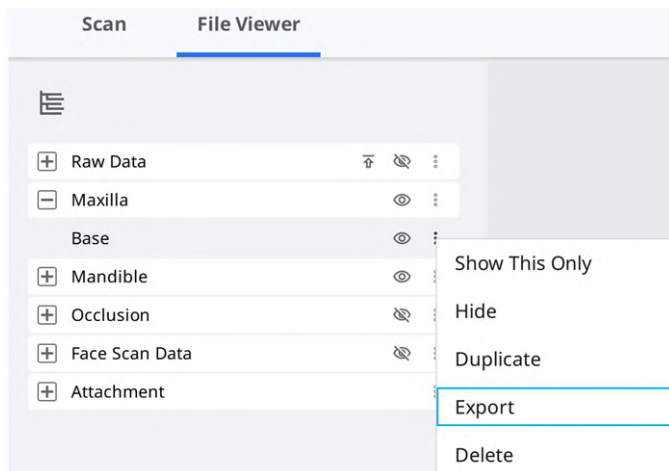

5. قم بتعيين المجلد الوجهة، اسم المجلد، اسم الملف، نوع الملف، تنسيق الشبكة، وتنسيق الصورة، وحدد خيارات التصدير في تبويب "الخيارات".

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

6. يمكنك رؤية أن الملفات التي اخترتها في شجرة البيانات فقط هي المحددة في قائمة الملفات.

Export Files in This Case

Options File List

☐ Maxilla
☐ Base
☒ Mandible
☒ Base
☐ Occlusion
☐ First Occlusion
☐ Second Occlusion
☐ Dynamic Occlusion
☐ Free
☐ Maxilla
☐ Mandible
☐ Face Scan Data
☐ Face Scan Data

Close Export

7. انقر على "تصدير".

8. انقر على "نعم" لفتح المجلد الذي تم حفظ الملفات فيه.

Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes


تصدير قائمة الحالات كملف CSV

يوفر Medit Link وظيفة لتصدير قائمة الحالات بتنسيق CSV.


يمكنك تصدير قائمة الحالات بالمعلومات الأساسية وإدارة الحالات بسهولة.

1. انتقل إلى Case Box أو Order Box أو In Box أو Work Box.

2. حدد الحالات التي تريد تصديرها.

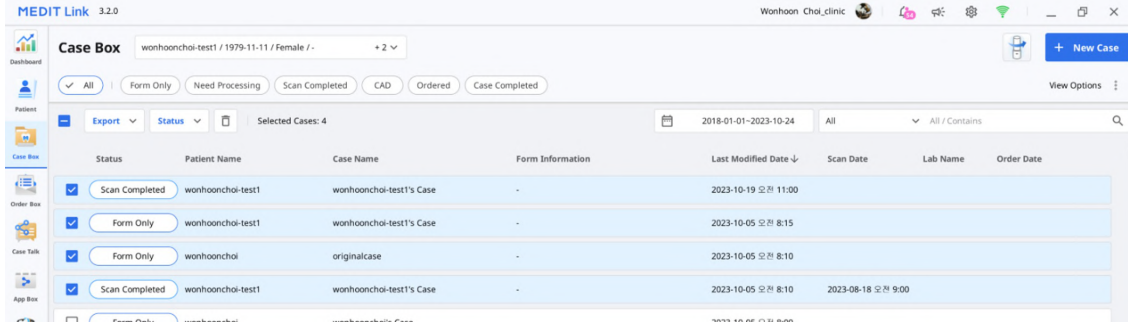

3. انقر على "تصدير" وحدد "قائمة الحالات (كما هو موضح)" أو "قائمة الحالات (مع كافة العناصر)".

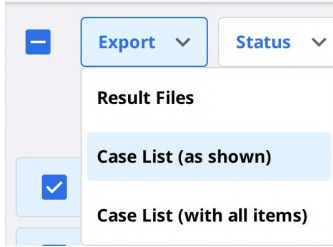

ملحوظة

قائمة الحالات (كما هو موضح): قم بتصدير قائمة الحالات بالعناصر المعروضة حاليًا على الشاشة. اذهب إلى خيارات العرض < عناصر الجدول لإظهار العناصر أو إخفاؤها حسب رغبتك.
قائمة الحالات (مع كافة العناصر): قم بتصدير قائمة الحالات بكل العناصر، بما في ذلك الحالة، اسم الحالة، تاريخ الميلاد، معلومات النموذج، تاريخ آخر تحديث، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب واسم المختبر.

4. حدد المسار واسم الملف، ثم احفظ القائمة.

5. يتم حفظ قائمة الحالات كملف CSV.

تصدير خط الإنهاء


يوفر Medit Scan for Clinics وظيفة لإنشاء خط الإنهاء، ويمكن لـ Medit Link نقل خط الإنهاء إلى برنامج CAD.

تصدير خط الإنهاء كلون

بشكل عام، يحول Medit Link خط الإنهاء إلى لون ويصدر النتيجة مع الفك العلوي أو الفك السفلي معًا. يمكنك إنشاء خط الإنهاء في CAD بالإشارة إلى معلومات اللون.

مثال:

الفك العلوي

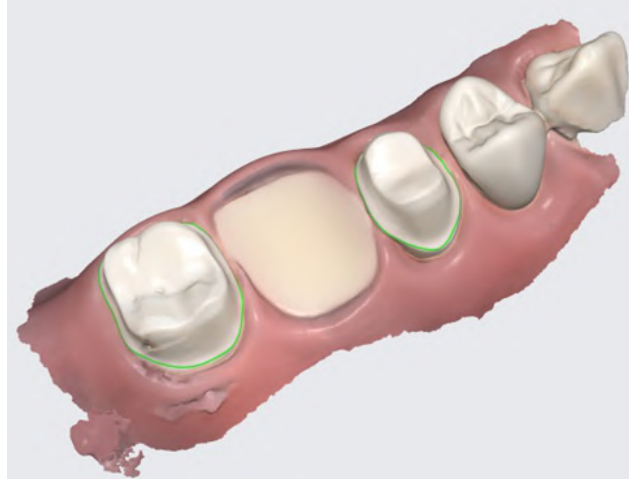

النتيجة بخطوط الإنهاء كمعلومات لونية

ملحوظة

تتوفر هذه الميزة للتنسيقات التي تتضمن معلومات الألوان، مثل OBJ، meditMesh، وPLY. لا يتم تحويل خط الإنهاء إلى STL.

ملحوظة



نوع < 3Shape لا يدعم هذه الميزة.

تصدير خط الإنهاء كملف

في حالة Exocad، يقوم Medit Link بتصدير خط الإنهاء إلى "margin.xyz" والذي يمكن استيراده إلى exocad مباشرة.

يمكنك استخدام هذا الملف في exocad دون عمل إضافي.

مثال:

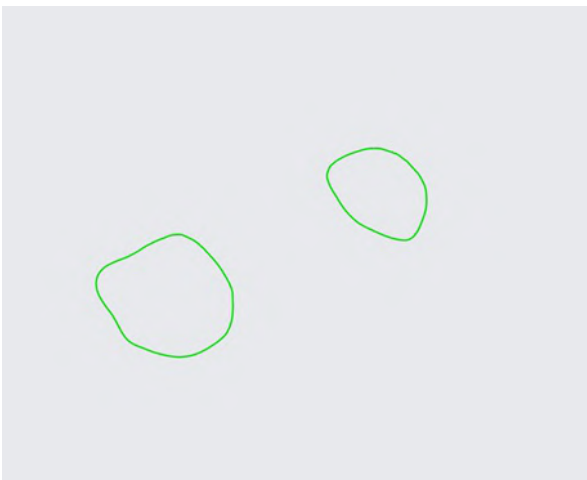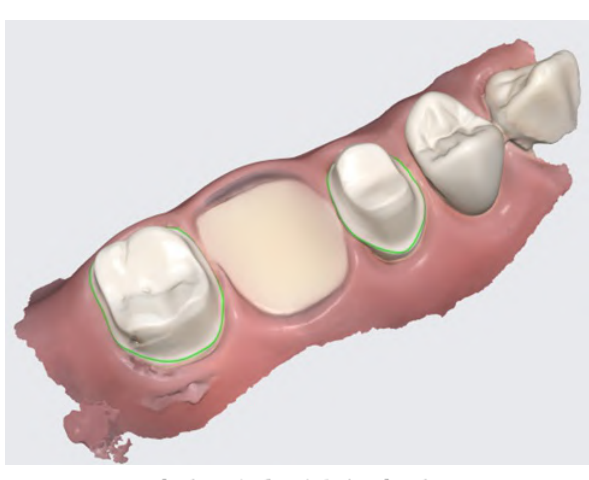خط الإنهاء	الفك العلوي
 خطوط الإنهاء مصغرة كمعلومات فردية	 النتيجة بخطوط الإنهاء كمعلومات لونية

تنزيل ملفات من موقع Medit Link

يوفر Medit Link وظيفة تنزيل.

إذا كنت ترغب في الحصول على ملفات النتائج دون تثبيت تطبيق Medit Link، يمكنك تنزيل الملفات من خدمة موقع Medit Link.

ملحوظة


يجب تحميل البيانات على سحابة Medit لتحميل الملفات من الموقع.

تتوفر وظيفة التنزيل في القائمة التالية على موقع Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

يمكنك العثور على زر "تنزيل" في الجزء العلوي الأيمن.

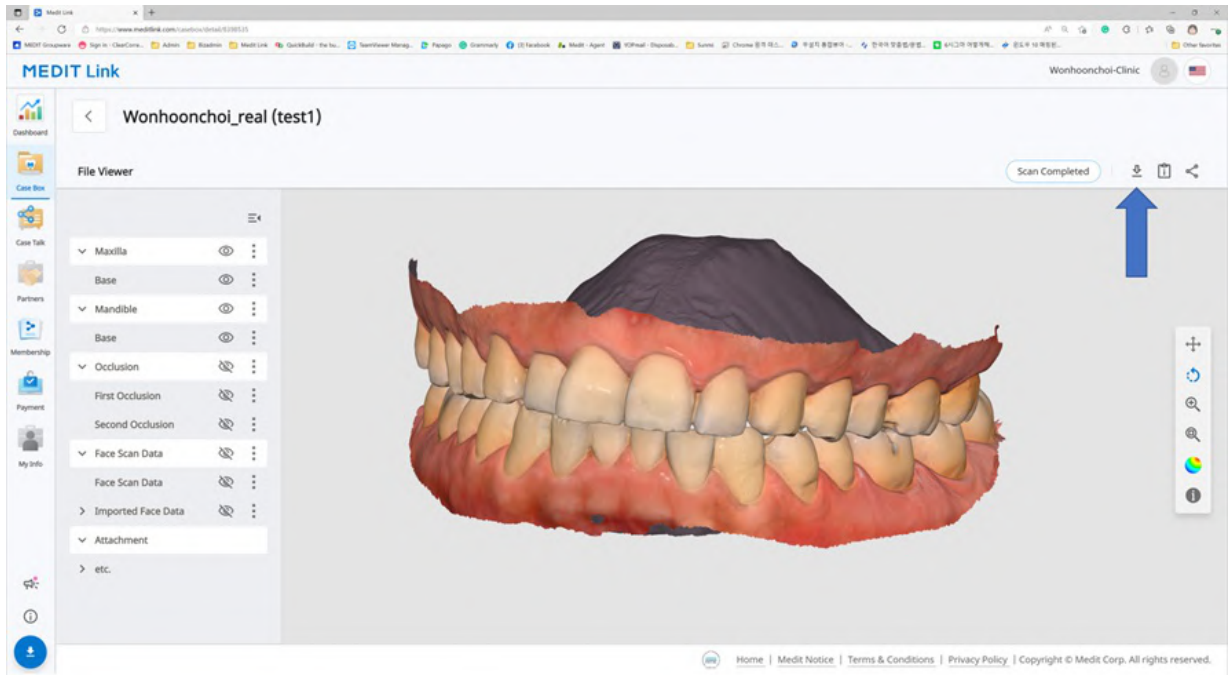

Web Viewer

عند مشاركة الحالة باستخدام Case Talk، يمكنك تعيين ما إذا كنت ستسمح بالتنزيل أم لا.

إذا قمت بتحديد "منح إذن التنزيل" وشاركت الحالة، سيتمكن جميع المستخدمين الذين يتصلون بالرابط المشترك من تنزيل الملفات.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.


Comment: Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

في ال Web Viewer، يمكنك العثور على رمز "تنزيل" في الجزء العلوي الأيسر.

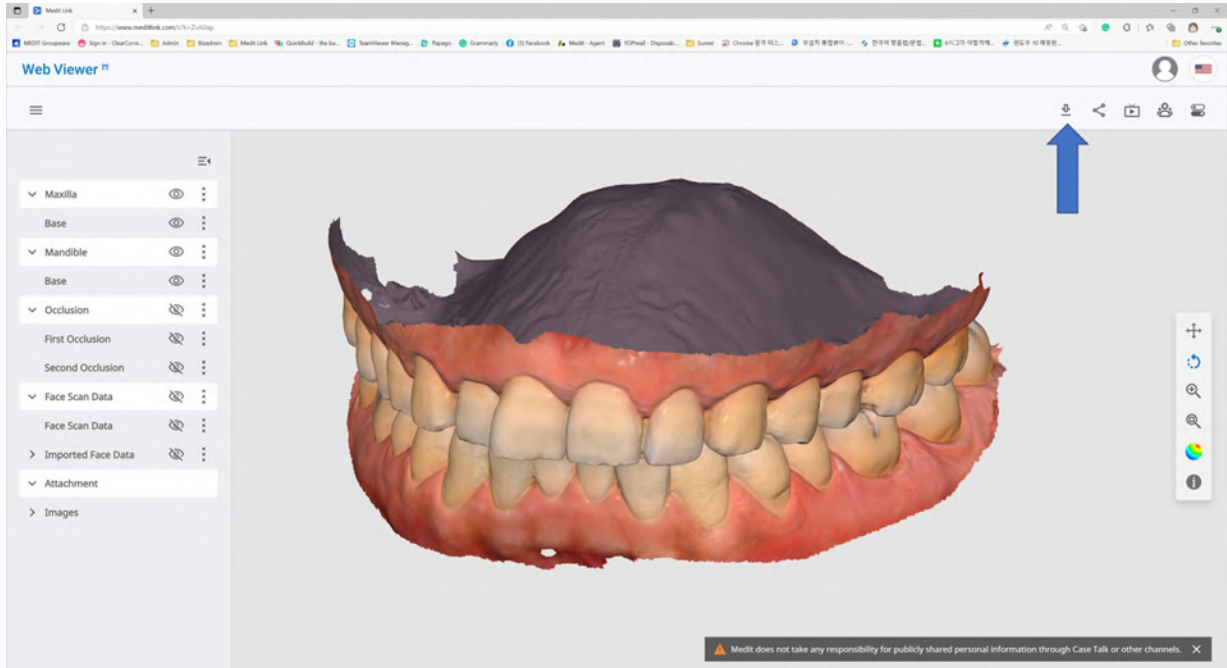

1. انقر على "تنزيل".



2. حدد تنسيق الشبكة من مربع حوار التنزيل.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

3. ثم انقر على "OK".

طلب/إدارة الطلبات

يمكنك بسهولة طلب حالة بيانات تم الحصول عليها من برامج متصلة وإرفاقها من قبل المستخدم.

طلب حالات

يمكنك تقديم طلب لشركائك في Case Box.

1. انقر على الزر "طلب".
2. تحقق من المعلومات المطلوبة لطلبك.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

3. اختر شريك.

4. تحقق من معلومات المنتج من علامة تبويب قائمة الطلبات.

• يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد مشاركة اسم المريض.

5. تحقق من الملفات للطلب من علامة تبويب قائمة الملفات.

6. أدخل تاريخ التسليم المطلوب.

• يتم تعيين القيمة الافتراضية على 7 أيام بعد تاريخ الطلب.

7. يمكنك إضافة مذكرة وعلامات لشريكك لتوضيح تفاصيل محددة.

8. عندما يتم إنشاء العديد من نتائج الإطباق على تطبيق المسح، يمكنك إرسال جميع نتائج الإطباق مرة واحدة عن طريق تحديد "ترتيب كافة العلاقات الإطباقية".

9. تابع طلبك.

تأكيد الطلب (In Box)

- اقبل الطلب عند استلامه.

- سيتم إعادة توجيه الطلبات المقبولة إلى Work Box.

إلغاء الطلب (Order Box)

- يمكنك إلغاء الطلب قبل أن يقبله شريكك.
- يمكن إعادة طلب الحالات الملغاة.

رفض طلب (In Box)

- يمكنك رفض طلب مستلم.
- يمكن إعادة طلب الحالات المرفوضة.

التحقق من الحالات المطلوبة

يمكنك التحقق من تفاصيل الحالة التي طلبتها من Order Box في حساب العيادة. يمكنك أيضًا التحقق من الحالة التي تلقيتها من In Box حساب المختبر.

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

المعلومات التي يمكن تضمينها في الطلب هي كما يلي: رقم تعريف الطلب / اسم المريض / اسم الحساب / تاريخ المسح / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم / تاريخ استحقاق التسليم / المذكرة. يمكنك التحقق من تفاصيل المنتج المطلوب و معلومات التوصيل.	معلومات الطلب
تعرض قائمة الطلب تفاصيل المنتج المطلوب.	قائمة الطلب
أدخل/تحقق من معلومات الشحن.	الشحن

إدخال معلومات الشحن (In Box)

أدخل معلومات الشحن للحالة المكتملة وابدأ الشحن.

1. انقر على علامة تبويب الشحن.
2. أدخل معلومات الشحن وانقر على "تسجيل".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. يتم إرسال المعلومات المدخلة إلى شريكك.

إدارة تاريخ التسليم

يمكنك تعيين تاريخ التسليم المتوقع عند تقديم طلب، وسيتم إرسال هذه المعلومات إلى شريكك.

تحديد تاريخ التسليم المطلوب (حساب العيادة)

- عند الطلب من Case Box، يمكنك إدخال تاريخ التسليم المطلوب.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 8:15 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

• You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

- المدة الافتراضية هي 7 أيام بعد تاريخ الطلب.
- أدخل التاريخ/الوقت الذي ترغب استلام المنتجات فيه وتابع الطلب.
- يمكنك ضبط الوقت بسهولة باستخدام شريط التمرير.

تحديد تاريخ التسليم المتوقع (حساب المختبر)

- يمكنك إدخال تاريخ التسليم المتوقع للحالة المطلوبة من In Box.

The screenshot shows the MEDIT Link 3.0.0 interface. The main window displays the 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic' order details. The 'Expected Delivery Date' field is highlighted with a blue box and a pencil icon, indicating it can be edited. The 'Order List' table shows three items: Implant Crown, Cementation Ty..., and Multi-Layered Zirconia, all with a price of 0.

1. تحقق من تاريخ التسليم المطلوب مع الشريك وأعد الجدولة باستخدام الزر "تعديل".



2. أدخل تاريخ التسليم المتوقع مع الأخذ في الاعتبار يوم العمل الفعلي. إذا لزم الأمر، يمكنك ترك تعليق أيضًا.

3. انقر على "تطبيق".

The screenshot shows a date picker interface for March 2022. The date 17 is selected. Below the calendar, there is a 'Delivery Time' section with a clock icon and a time range from 11:45 AM to 8:00 PM. A 'Comment' text area is also present.

4. سيتم إعادة توجيه تاريخ التسليم المتوقع والمذكورة مع الطلب.

• يمكنك التحقق من التاريخ والمذكرات في Order Box.

• يمكنك تغيير تاريخ التسليم المتوقع، وستتم إعادة توجيه التغييرات إلى شريكك.

5. يمكنك التحقق من سجل الحالة باستخدام زر "سجل".



إكمال الحالة

الإكمال (Work Box/In Box)


بمجرد الانتهاء من جميع المهام، انقر على "تم" لإكمال الحالة.

أكمل حالة من تفاصيل الحالة

يمكنك العثور على أيقونة النقاط الثلاث على اليمين من زر "فتح" أو "إعادة المسح".



أكمل العمل بالنقر على الأيقونة واختيار "Done".

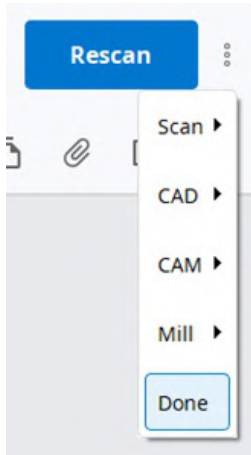

أكمل الحالات المتعددة من قائمة الحالات

1. اذهب إلى Work Box.
2. حدد جميع الحالات التي تريد إكمالها.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard

In Box

Work Box

Case Talk

App Box

Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export Status Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
✓ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
✓ Form Only	test's Case	test	-
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. انقر على "الحالة" وحدد "Done".

الإكمال (Case Box/Order Box)

بعد اكمال الحالة من ناحية المختبر، تحتاج العيادة إلى تأكيد الحالة لإكمال عملية الطلب بأكملها.

يمكن للعيادة العثور على زر "تأكيد التسليم" في Order Box في حالة اكمال المختبر عمله.


انقر على هذا، تكتمل عملية الطلب، وسيتم تغيير حالة الحالة إلى "Case Completed".

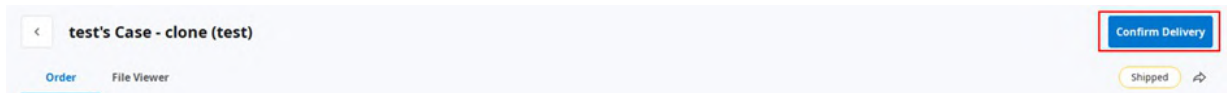

أكمل حالة غير مطلوبة في Case Box

بالنسبة للحالات التي لم يتم طلبها من المختبر، يمكنك إكمال هذه الحالات في Case Box.

1. اذهب إلى Case Box.
2. حدد الحالة التي تريد إكمالها.

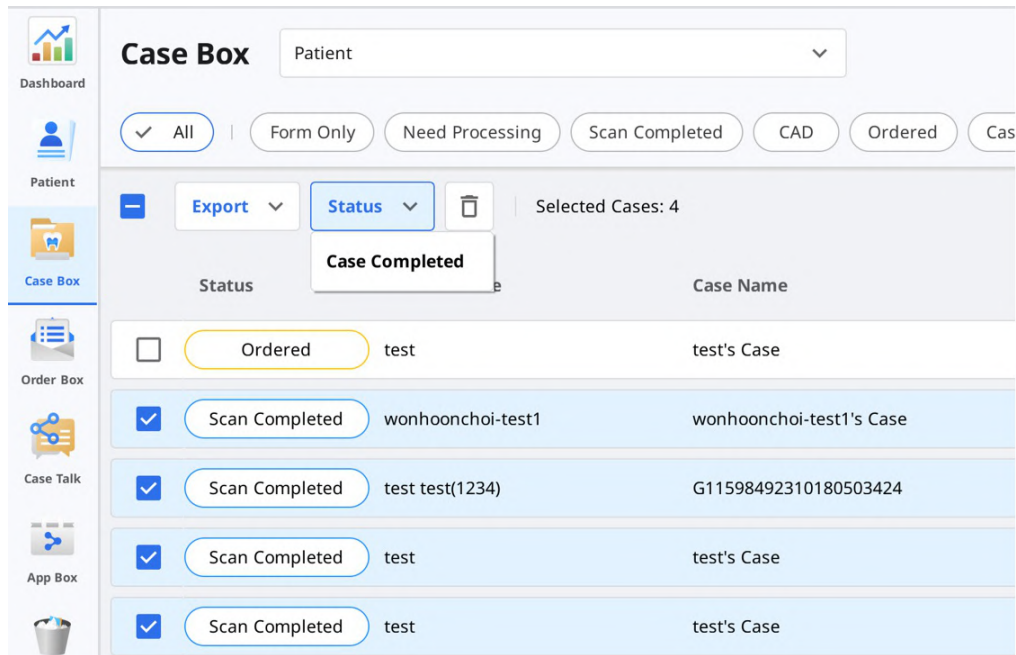

3. انقر على "الحالة" وحدد "Case Completed".

التواصل باستخدام العلامات

يمكنك إضافة معلومات إضافية عن حالتك باستخدام العلامات وإرسالها إلى شركائك.

إضافة علامات عند إنشاء حالة جديدة

يمكنك إدخال علامات عند إنشاء حالة جديدة أو تعديل معلومات الحالة.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

يمكنك بسهولة البحث عن وتحديد العلامات التي استخدمتها من قبل.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

إضافة علامات عند الطلب

يمكنك التحقق من العلامات وتعديلها في مربع حوار الطلب أثناء الطلب.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00
PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

تحقق من العلامات في تفاصيل الحالة

MEDIT Link 3.2.0

Order Open

Scan Completed

Form File Viewer

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Raw Data

Maxilla

Base

Mandible

Base

Occlusion

Occlusal Relationship 1

Memo

Tags

Dr_Name × Worker_Name ×

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Save