

USER GUIDE

Medit Link

Table of Contents

Medit Link

7	مقدمة
7	Medit Link
7	نظرة عامة على الخدمة
8	الخدمات السحابية
8	منصة إدارة سير العمل مع نظام الطلب

Medit Link < التثبيت

9	متطلبات النظام
9	متطلبات النظام لـ Windows
9	متطلبات النظام لـ macOS
9	متطلبات النظام لخدمة الويب
9	الموصى به للمتصفحات
9	الحد الأدنى للأجهزة المحمولة
10	التثبيت على Windows
13	التثبيت على macOS



Medit Link < بدء الاستخدام

17	إنشاء حساب وتسجيل الدخول
17	موقع Medit Link
17	إنشاء حساب
19	تسجيل الدخول وصفحة الترحيب

Medit Link < موقع Medit Link

21	Dashboard
21	نظرة عامة على الـ Dashboard
21	Medit Insights
22	الاشتراك في Medit
22	Insights
23	إلغاء الاشتراك في Medit
23	Insights
24	Patient
24	البحث عن المرضى
25	Case Box/Work Box
25	فترة الحالات
25	فترة حسب المريض
26	الفترة حسب الحالة
27	الفترة حسب المدة
27	الفترة حسب البحث
27	تفاصيل الحالة
29	Order Box/In Box
29	تفاصيل الطلب
29	علامات التبويب في Order
29	Box/In Box
30	Case Talk
30	إنشاء Case Talk
31	تحديد نوع إذن المشاركة وخيارات المشاركة
33	Case Talk تفاصيل
33	Web Viewer
34	

35	التعليقات
36	مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي
36	شجرة البيانات
36	التحكم بشجرة البيانات
37	ضوابط النموذج ثلاثي الأبعاد
38	Partners
38	البحث عن شركاء
38	قائمة شركائي
39	دعوة شركاء
40	Membership
40	عضوية
41	خطي
41	التخزين السحابي
42	الاشتراك
44	إلغاء الاشتراك
45	معلومات الفواتير
45	كيفية إضافة طريقة دفع
46	كيفية تغيير طريقة الدفع
47	الاسترداد
47	تسجيل رمز الاسترداد
48	تفعيل رمز الاسترداد
49	My Info
49	حسابي
49	عيادتي/مختبري (حساب المشرف فقط)
50	الماسح الضوئي الخاص بي
51	قوائم أخرى
51	الإخطارات & التحديثات
51	معلومات عن Medit
51	تنزيل تطبيق Medit Link

Medit Link < تطبيق Medit Link

53	نظرة عامة
53	يلخص الجدول أدناه القوائم المتوفرة في كل نوع من حسابات العيادات والمختبرات.
54	شريط العنوان
54	My Information
54	إشعارات
55	الإخطارات & التحديثات
55	الإعدادات
56	حالة الشبكة
58	الإعدادات
58	عام
59	إدارة التخزين
59	الفترة المحددة
59	التخزين المحلي
59	التخزين السحابي
60	تحديد البرنامج المتصل
60	خيارات التصدير
62	أداة تحويل الحالة
62	تصدير الحالة
63	إستيراد حالة
65	خيارات الوكيل
65	حول

	دليل المستخدم
67.....	القائمة
67.....	Dashborad
67.....	Patient
68.....	إضافة مريض جديد
68.....	حذف مريض
68.....	دمج مرضى
69.....	Case Box/Work Box
70.....	علامات التبويب في Case Box/Work Box
70.....	الوظائف في Case Box/Work Box
71.....	Order Box/In Box
71.....	علامات التبويب في Order Box/In Box
71.....	Case Talk
72.....	App Box
72.....	Trash Box
73.....	مدير مزامنة الحالات
73.....	التحميل
74.....	التنزيل
74.....	معلومات عن Medit
76.....	عارض الملفات
76.....	شجرة البيانات
76.....	أدوات التحكم في النموذج
76.....	التحكم في النموذج ثلاثي الأبعاد
77.....	التحكم بالصور ثنائية الأبعاد
78.....	أدوات وظيفية
78.....	التقاط الصور والمذكرة
78.....	Ortho Capture
79.....	ملء الثقوب
79.....	القص
82.....	تحسين محاذاة الإطباق
83.....	حركة الفك السفلي
84.....	إدارة بيانات الإطباق المتعدد في عارض الملفات
84.....	كيفية إدارة نتائج متعددة
86.....	خيارات العرض
86.....	فلاتر الحالة
87.....	نوع العرض
87.....	التجميع
87.....	الفرز
89.....	الفلتر والبحث
89.....	فلتر حسب المريض
90.....	الفلتر حسب التاريخ
90.....	إمكانات البحث المتقدم

Medit Link < سير العمل

92.....	إنشاء / تعديل / استنساخ / حذف الحالات
92.....	إنشاء حالات
92.....	إنشاء حالات في Case Box (العيادة)
93.....	إنشاء حالات في Work Box (المختبر)
93.....	تعديل الحالات

93	تعديل الحالات في Case Box (العيادة)
94	تعديل الحالة في Work Box (المختبر)
95	استنساخ الحالات
95	استنساخ حالة في Case Box (العيادة)
95	استنساخ حالة في Work Box (المختبر)
96	حذف حالة
96	حذف حالة (العيادة والمختبر)
97	معلومات التسجيل
97	تسجيل معلومات التسجيل في Case Box
97	الإدخال في علامة تبويب النموذج
97	الإدخال في علامة تبويب CAD
97	تسجيل معلومات التسجيل في Work Box
97	الإدخال في علامة تبويب النموذج
98	الإدخال في علامة تبويب CAD
98	توصيل الأسنان بجسر
98	ضبط خيارات المسح
98	Medit Scan for Labs
98	خيارات عامة
98	خيارات بالأسنان
99	الإضافة إلى المفضلات
99	الإضافة إلى المفضلات
99	إدارة القوالب المفضلة
100	العمل على المسح/CAD
100	عملية المسح
100	عملية CAD
101	الحصول على ملفات النتائج
101	تصدير ملفات نتائج المسح
102	تصدير ملفات النتائج من قائمة الحالات
103	تصدير ملفات النتائج من عارض الملفات
105	تصدير ملفات النتائج من شجرة البيانات
107	تصدير قائمة الحالات كملف CSV
107	تصدير خط الإنهاء
107	تصدير خط الإنهاء كلون
108	تصدير خط الإنهاء كملف
108	تنزيل ملفات من موقع Medit Link
109	Case Box/Work Box
109	Web Viewer
112	طلب/إدارة الطلبات
112	طلب حالات
112	تأكيد الطلب (In Box)
113	إلغاء الطلب (Order Box)
113	رفض طلب (In Box)
113	التحقق من الحالات المطلوبة
113	إدخال معلومات الشحن (In Box)
114	إدارة تاريخ التسليم
114	تحديد تاريخ التسليم المطلوب (حساب العيادة)
115	إكمال الحالة
115	الإكمال (Work)
115	(Box/In Box)
116	أكمل حالة من تفاصيل الحالة
116	أكمل الحالات المتعددة من قائمة الحالات
116	الإكمال (Case)
116	(Box/Order Box)

117.....	أكمل حالة غير مطلوبة في Case Box
118.....	التواصل باستخدام العلامات
118.....	إضافة علامات عند إنشاء حالة جديدة
118.....	إضافة علامات عند الطلب
119.....	تحقق من العلامات في تفاصيل الحالة

مقدمة

Medit Link

Medit Link هي أداة

تعاونية مصممة لتسهيل التواصل بين العيادات والمختبرات لتوفير سير عمل محسن لكل الأطراف.

يقدم ميزات متباينة بناءً على نوع وأذونات كل حساب. يوفر البرنامج واجهة مستخدم سهلة الاستخدام لإدارة سير العمل، من المسح الضوئي باستخدام الماسحات الضوئية الفموية والنموذجية، إلى طلب الحالات، إلى تصميم التعويضات وإنتاجها.

يتكون Medit Link من خدمة ويب وتطبيق كمبيوتر.

نظرة عامة على الخدمة

التطبيق	الموقع		
- إدخال معلومات النموذج - المسح - إدارة الطلبات - الربط بـ CAD - إدارة المرضى	- تسجيل وإدارة الحساب - البحث - البحث وإدارة الشركاء - مشاركة الحالات عبر Web Viewer برابط قابل للمشاركة - فتح حالات منشأة على التطبيق - إدارة الطلبات		
أدخل معلومات النموذج، قم بالمسح الضوئي، قم بالربط مع CAD، قَدِّم طلبات، وقم بإدارة المرضى. - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box	قم بالبحث وإدارة الشركاء والعيادات الخاصة بك، ومشاركة الحالات. - Dashboard - Patient - Case Box - Order Box - Case Talk - Partners - Membership - My Info	مشرف	العيادة
- Patient - Case Box - Case Talk - App Box - Trash Box	- Patient - Case Box - Case Talk - My Info	عضو	
أدخل معلومات النموذج، قم بالمسح الضوئي، اربط مع CAD، وقم بإدارة الطلبات. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box	ابحث وقم بإدارة الشركاء ومختبرك، وشارك الحالات. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Partners - Membership - My Info	مشرف	المختبر

- Work Box • - Case Talk • - App Box • - Trash Box •	- Work Box • - Case Talk • - My Info •	عضو	
---	--	-----	--

الخدمات السحابية

يدعم Medit Link التحميل/التنزيل التلقائي لقواعد البيانات والملفات من خلال AWS (Amazon Web Services).

تتم مزامنة البيانات المخزنة في السحابة تلقائيًا مع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمستخدمين متعددين في المنظمة حتى يتمكنوا من الوصول إلى نفس البيانات من أي جهاز كمبيوتر في أي وقت. تعمل ميزة النسخ الاحتياطي والاسترداد المستندة إلى السحابة على الحفاظ على أمان جميع بياناتك. إنها تحافظ على بياناتك آمنة حتى في حالة فقد البيانات بسبب فشل الكمبيوتر المفاجئ.

تتيح الخدمة السحابية لأطباء الأسنان والمختبرات مشاركة البيانات بسرعة دون متاعب إرسال بريد إلكتروني أو نقل عمليات المسح يدويًا. يتم تشفير جميع البيانات، بما في ذلك معلومات المريض، وتخزينها ونقلها بشكل آمن. يتوافق Medit مع القوانين واللوائح الطبية مثل HIPAA و GDPR.

منصة إدارة سير العمل مع نظام الطلب

يقدم Medit Link نظام الطلب الخاص به.

- يتيح Medit Link للمستخدمين إقامة شراكات بين أطباء الأسنان ومختبرات الأسنان ومشاركة البيانات بسرعة وسهولة.
- يمكنك التحقق من حالة الطلب وإدارتها.

متطلبات النظام

ملحوظة

يرجى الرجوع إلى متطلبات النظام لـ Medit Scan for و Medit Scan for Clinics Labs إذا كنت ترغب في استخدام برنامج المسح مع الماسح الضوئي الخاص بك.

متطلبات النظام لـ Windows

حاسوب محمول & كمبيوتر سطح المكتب	
Intel Core i5 2.6 GHz أو أعلى	CPU
16 GB أو أعلى	RAM
NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) أو أحدث / أو بطاقة فيديو AMD مكافئة	الرسومات
Windows 10 64 Bit (غير متوفر في Bit 32) أو أعلى	OS

متطلبات النظام لـ macOS

Mac	
M1 مع 8-Neural Engine، 16-core GPU، 7-core	المعالج
16 GB أو أعلى	RAM
Monterey 12	نظام التشغيل

متطلبات النظام لخدمة الويب

الموصى به للمتصفحات

المتصفحات	
(Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium	الكمبيوتر
Chrome, Firefox	Android
Safari, Chrome, Firefox	iOS


الحد الأدنى للأجهزة المحمولة

iOS	Android	
ما يعادل iPhone 7 أو أعلى	ما يعادل Galaxy S7 أو أعلى	الجهاز
iOS 11.0	Android 7.1 Nougat	نظام التشغيل
2 GB أو أعلى	3 GB أو أعلى	RAM
A10 Fusion	أعلى من Snapdragon 710	AP


التثبيت على Windows

يتم تثبيت Medit Link كحزمة مع برامج اكتساب المسح - Medit Scan for Clinics و Medit Scan for Labs.


1. قم بتشغيل Medit_LinkSetup.exe.
2. حدد لغة للتثبيت.
3. حدد المجلد لتثبيت Medit Link. يرجى قراءة شروط وأحكام الترخيص والموافقة عليها والنقر على "تثبيت".

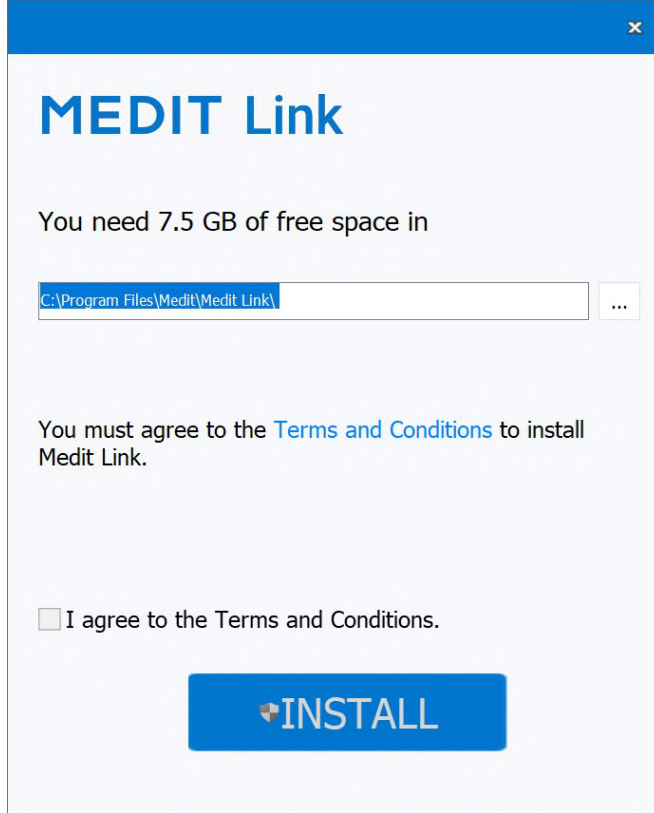

4. تأكد من فصل كبل الماسح الضوئي عن الكمبيوتر قبل الانتقال إلى الخطوة التالية. قد لا يبدأ التثبيت إذا كان الماسح متصلاً بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
5. سيتم تثبيت البرنامج تلقائيًا وقد يستغرق بضع دقائق. لا تقم بإيقاف تشغيل أو فصل جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل أن يكتمل التثبيت.

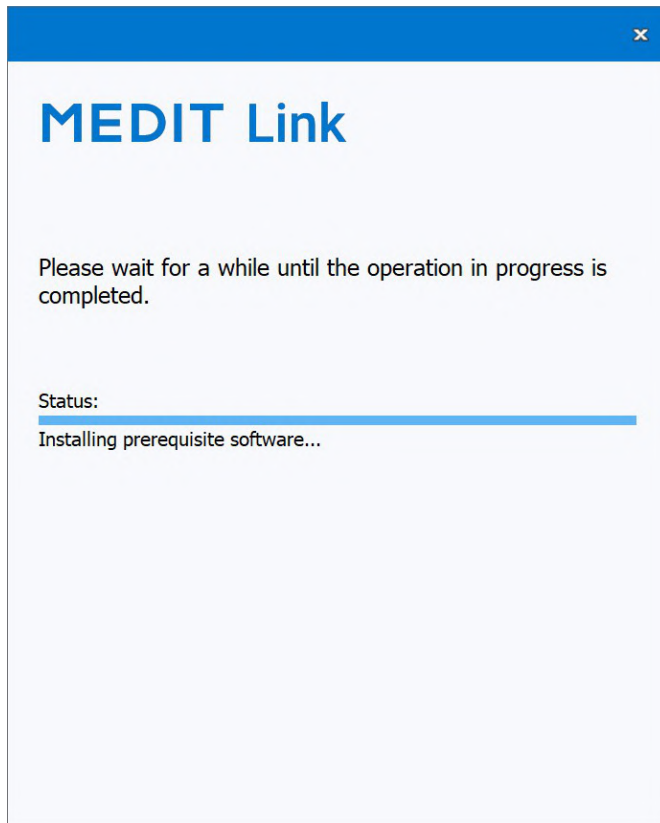

6. يرجى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد اكتمال التثبيت. يمكنك المتابعة بدون إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر إذا لم يكن لديك الماسح الضوئي.

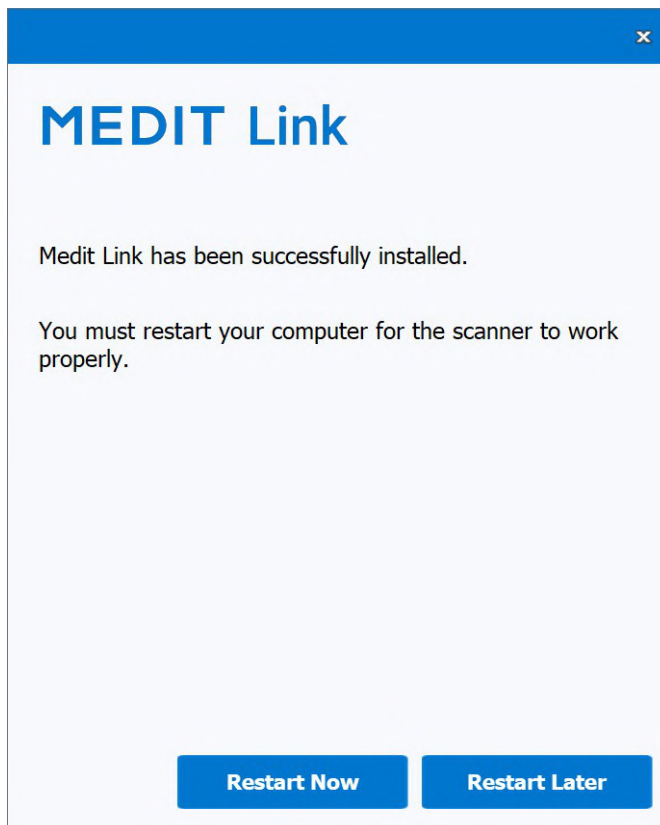


ملحوظة

إذا لم تقم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد اكتمال التثبيت، فقد لا يعمل الماسح الضوئي بشكل صحيح.


التثبيت على macOS

يتم تثبيت Medit Link كحزمة مع Medit Scan for Clinics.


1. قم بتشغيل Medit_Link_x.x.x.pkg وانقر على "متابعة".

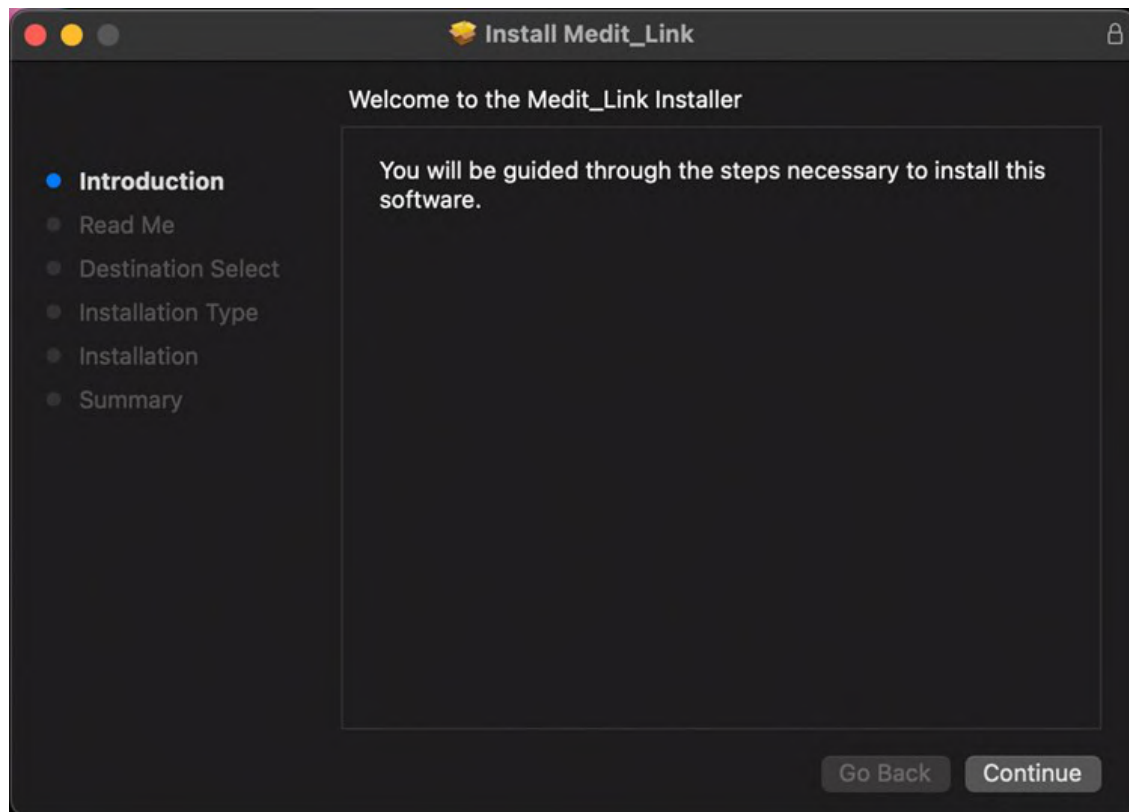


2. اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وانقر على "متابعة".

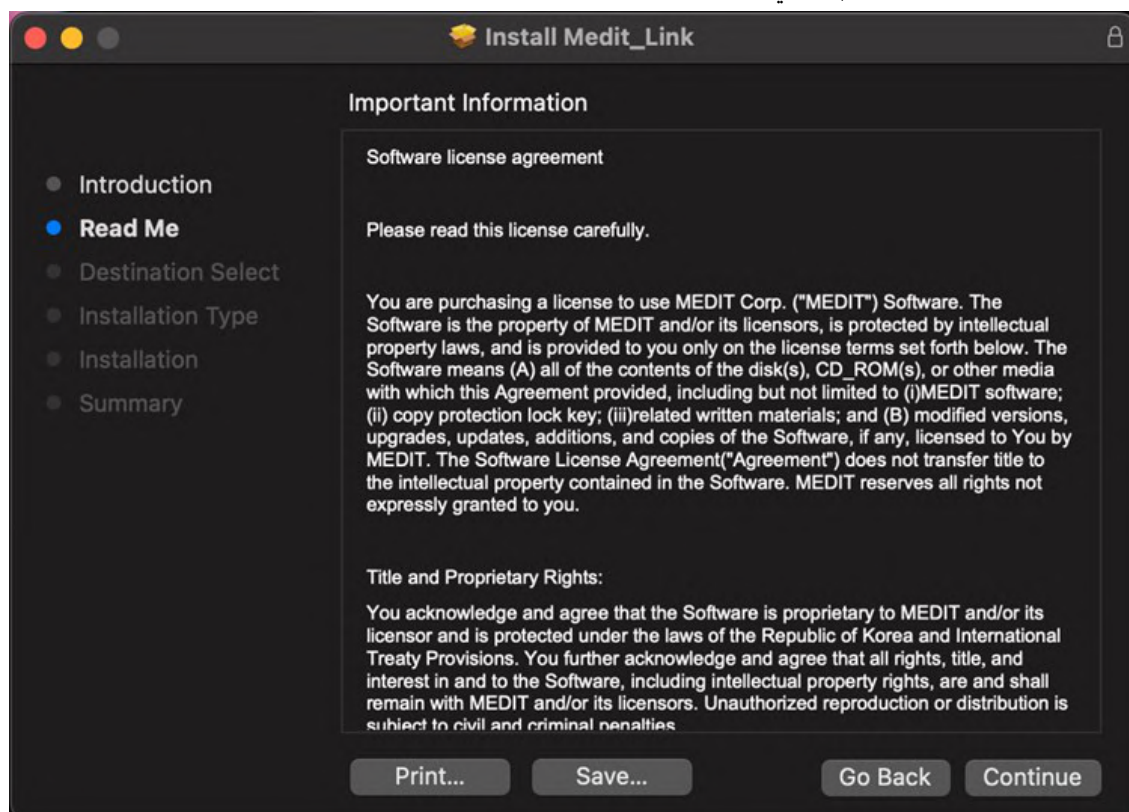

3. حدد القرص المراد تثبيته وانقر على "متابعة".

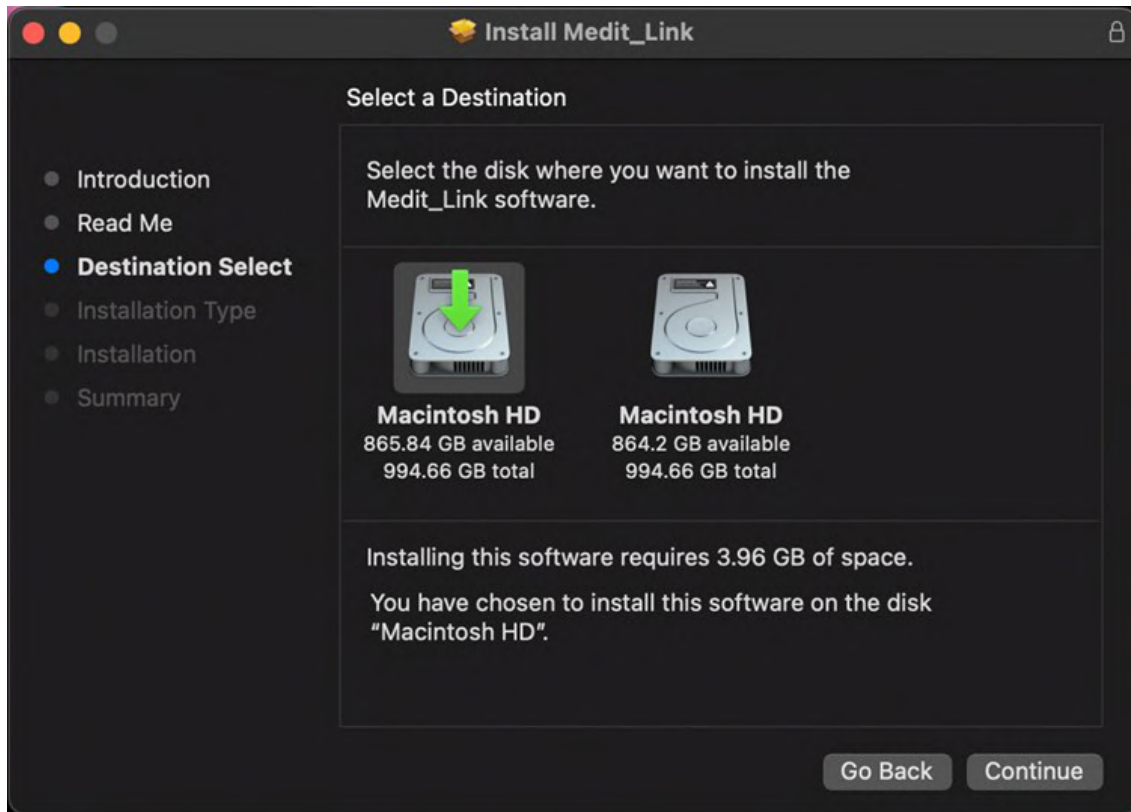


4. انقر على "تغيير موقع التثبيت..." لتغيير وجهة التثبيت.

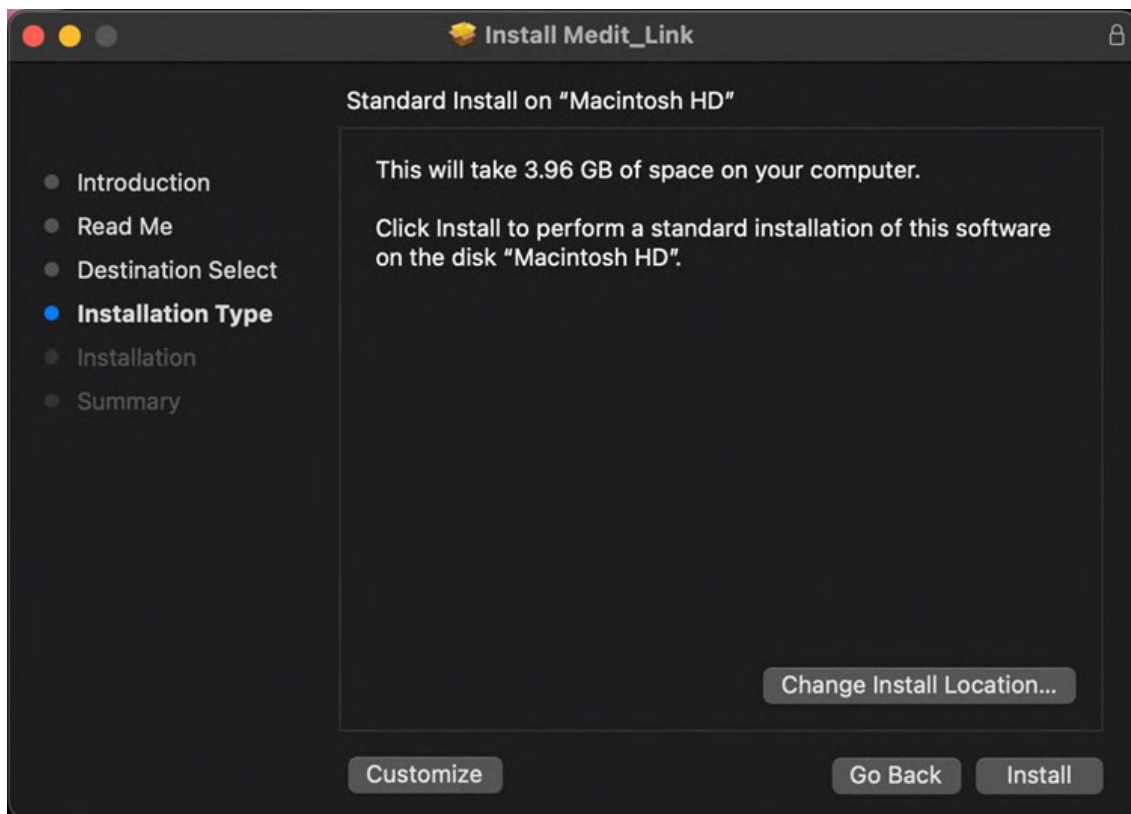


5. انقر على "تثبيت" واكتب كلمة مرور الMac للسماح بالتثبيت إذا طُلب منك ذلك.



6. انتظر حتى اكتمال التثبيت.

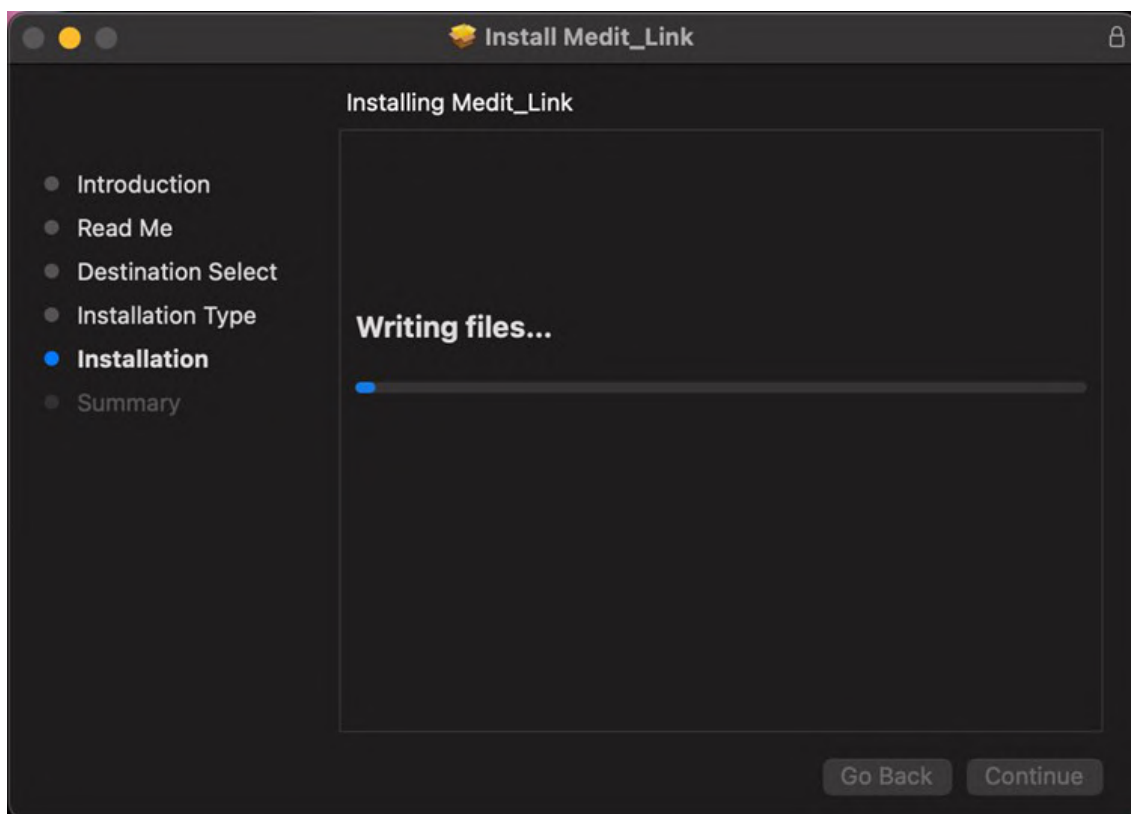


7. انقر على "إغلاق" للخروج من نافذة التثبيت.

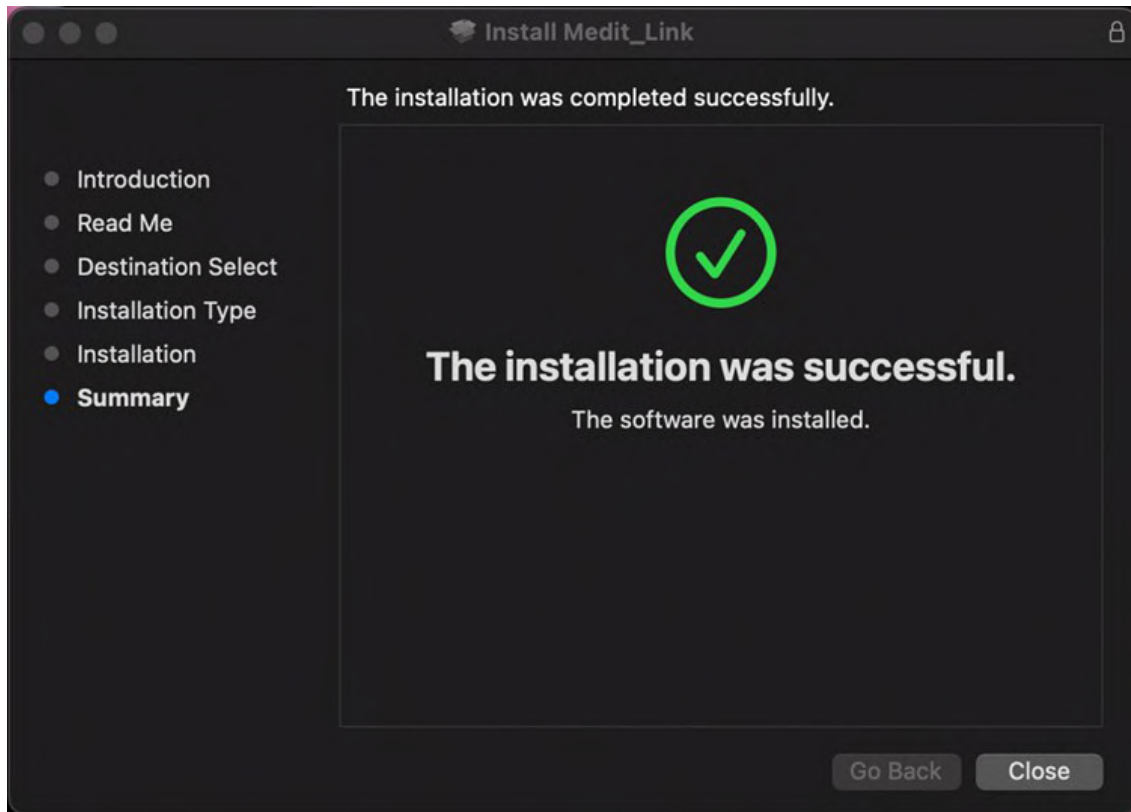

إنشاء حساب وتسجيل الدخول

موقع Medit Link

اشترك في خدمة Medit Link على www.meditlink.com.

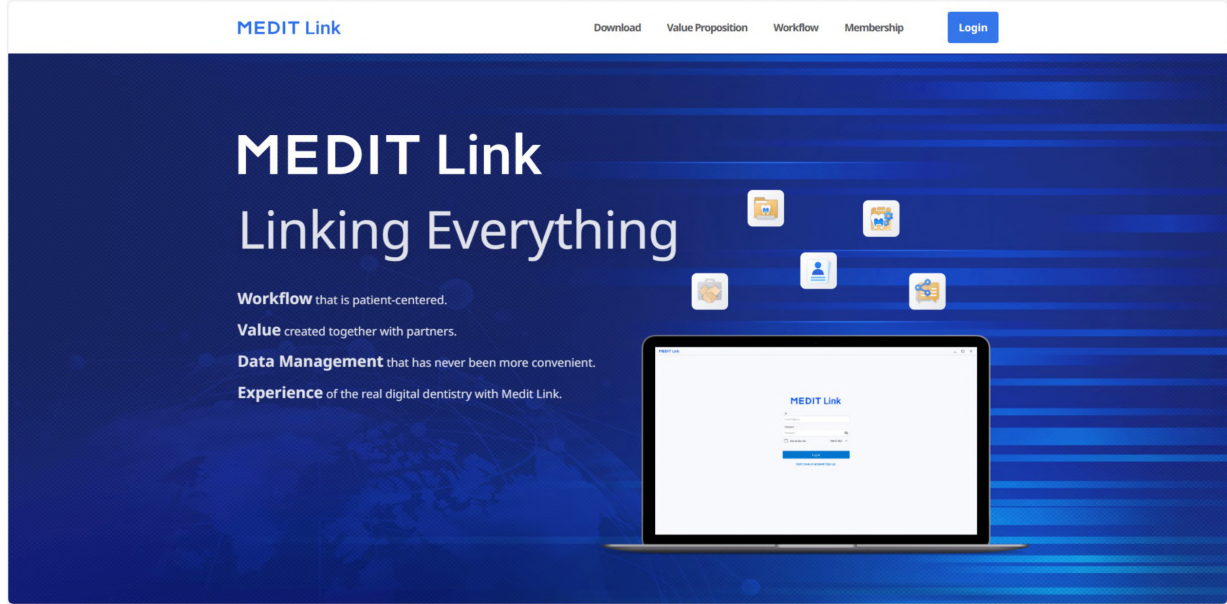

ملحوظة

تسجل في Medit Link China على www.meditlink.cn.

إنشاء حساب

لاستخدام خدمة Medit Link، يجب عليك إنشاء حساب. يمكنك الاستفادة من الميزات المتوفرة في Medit Link بعد إنشاء حساب كعيادة أو مختبر.

يمكن للمستخدمين اختيار أحد أنواع الحسابات الأربعة التالية للحصول على عضوية واستخدام الخدمة بامتيازات كاملة أو محدودة، حسب نوع الحساب.

- عيادة - مشرف
- عيادة - عضو
- مختبر - مشرف
- مختبر - عضو

عادةً، يكون المشرف ممثلاً عن مؤسستك ويكون له حق الوصول الكامل إلى جميع وظائف وخدمات Medit Link. في المقابل، حساب العضو لديه وصول محدود.

لإنشاء حساب والحصول على عضوية، اتبع الخطوات التالية:

1. انقر على "ليس لديك حساب بعد؟" أنشؤوا حساب على صفحة تسجيل الدخول.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password



☐ Keep me logged in.

Need help? -

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)



English (United States)



2. بعد قراءة الوصف المقدم، انقر على زر "تسجيل" لنوع الحساب الذي تريده.



Clinic

Administrator

Dentist (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order
- ✓ Member Management

Register



Lab

Administrator

Representative/Leader (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order Management
- ✓ Member Management

Register

Member

Dental Hygienist and Dental Staff

In order to use Medit Link, join your group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Oral Scanning

Register

Member

Laboratory Employees

In order to use Medit Link, join your lab's group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Receiving Data for Making Dental Prostheses
- ✓ Sharing work files and production processes.

Register

3. يظهر نموذج التسجيل التالي.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

1 Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.
 2 Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country

Select Country

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.
☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 3 Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. أدخل اسم العيادة أو المختبر ثم، بناءً على نوع الحساب الذي تريده، قم بما يلي:
 - إذا كنت تقوم بالتسجيل كمشرف، فانقر على "التحقق من التوفر" لمعرفة ما إذا كان الاسم الذي تم إدخاله متاحًا.
 - إذا كنت تقوم بالتسجيل كعضو، انقر على "بحث". يجب أن يقوم المشرف بتسجيل مؤسستك بالفعل قبل أن تنشئ حساب.
5. املأ بقية نموذج التسجيل وانقر على "تسجيل".

ملحوظة

إذا وافقتم على تلقي معلومات تسويقية أثناء التسجيل، فسوف تتلقون معلومات مفيدة حول المنتج والخدمة من Medit.

6. سيتم إرسال بريد إلكتروني للتحقق لك.
7. لإكمال عملية التسجيل، تحقق من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك باستخدام الرابط المستلم.

تسجيل الدخول وصفحة الترحيب

1. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول وانقر على "تسجيل الدخول".

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password


☐ Keep me logged in. [Need help?](#)

[Log In](#)

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) ▼

2. سيظهر مربع الحوار التالي إذا لم تقوموا بملء معلومات عملكم.

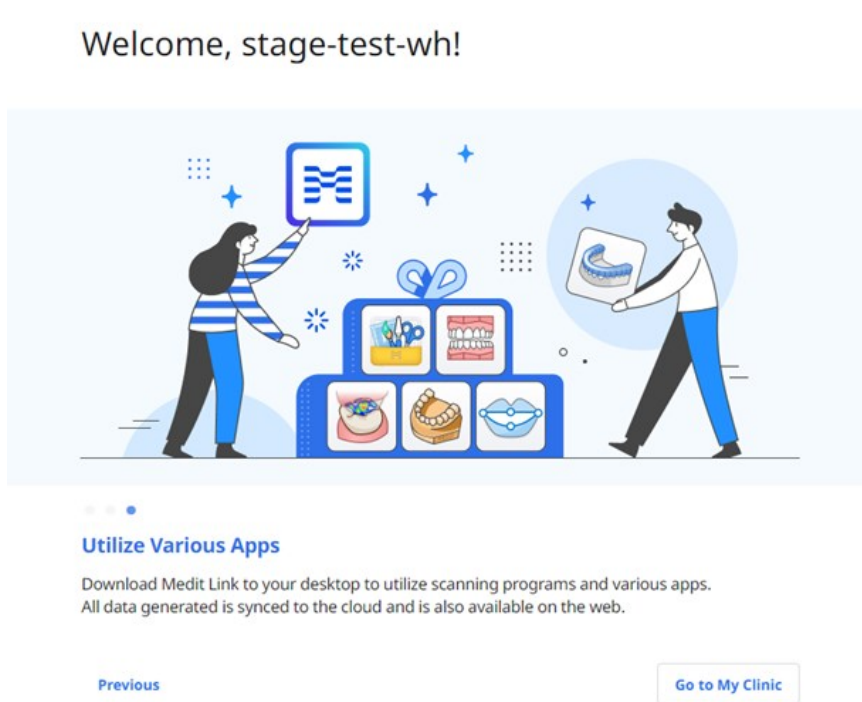

ملحوظة


لاستخدام خدمات Medit Link، يجب إدخال معلومات عيادتكم أو مختبركم باستخدام حساب المشرف.

- انقروا على الزر "الذهاب إلى عيادتي" أو "الذهاب إلى مختبري" وأدخلوا معلومات العيادة أو المختبر، بما في ذلك اسم الشركة، صور الغلاف/الشعار، الخدمات التي تقدموها، عنوان المكتب، رقم المكتب وما إلى ذلك.
- المعلومات التي تم إدخالها في صفحة الترحيب يمكن تعديلها في أي وقت على تبويب My Info < عيادتي أو مختبري على موقع Medit Link.

Dashboard

نظرة عامة على الـ Dashboard

يمكنك عرض الإحصائيات الخاصة بجميع الأعمال المنجزة على Medit Link في الرسوم البيانية والمخططات المرئية - سواء في تطبيق Medit Link أو على الموقع الإلكتروني.

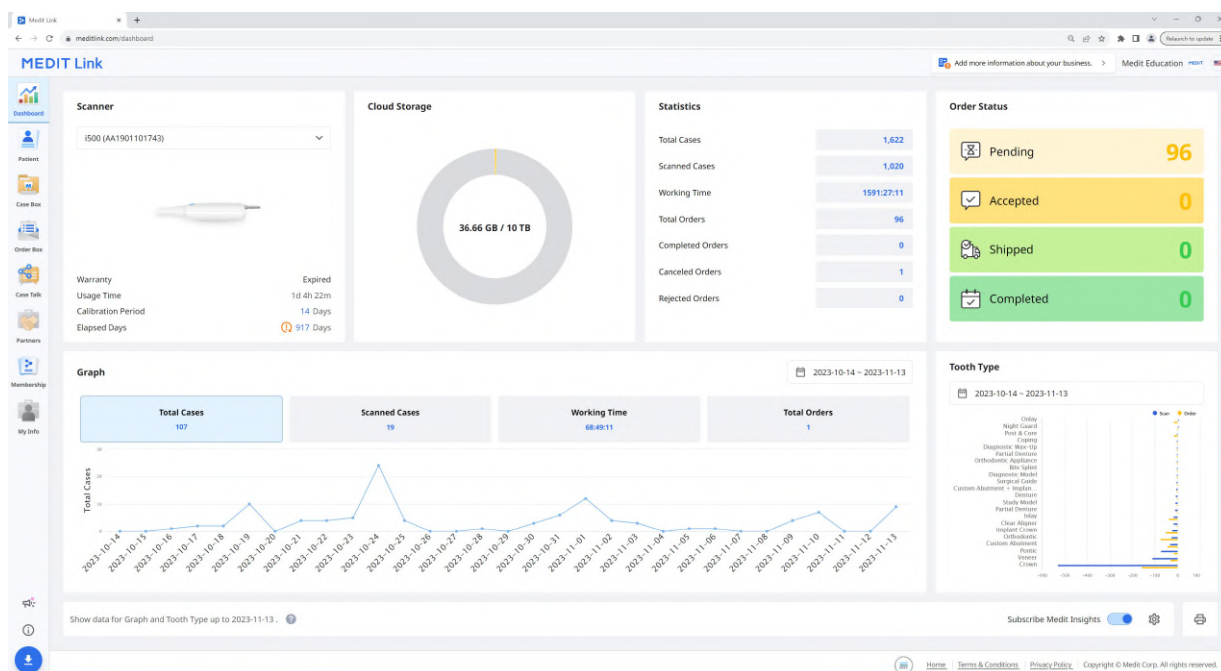

تعرض الرسوم البيانية والمخططات في الـ Dashboard إحصائيات لجميع الأعمال المنجزة في Medit Link.

الماسح الضوئي	قم بتوفير معلومات حول الماسحات الضوئية النشطة، بما في ذلك الضمان، وقت استخدام الماسح الضوئي، الفاصل الزمني للمعايرة والوقت المنقضي للمعايرة.
التخزين السحابي	عرض السعة الإجمالية للسحابة والمقدار المستخدم.
الإحصائيات	تقديم إحصائيات عن الحالات بناءً على حالة العمل.
حالة الطلب	تقديم إحصائيات عن الحالات بناءً على حالة الطلب.
الرسم البياني	رسم معلومات الوظيفة حسب الفترة الزمنية.
نوع السن	توفير إحصائيات عن عدد عمليات المسح والطلبات حسب معلومات العلاج.


Medit Insights

Medit Insights هي خدمة تقارير تساعدك على تحليل إحصائيات الاستخدام الخاصة بك.

ملحوظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

• Medit Insights

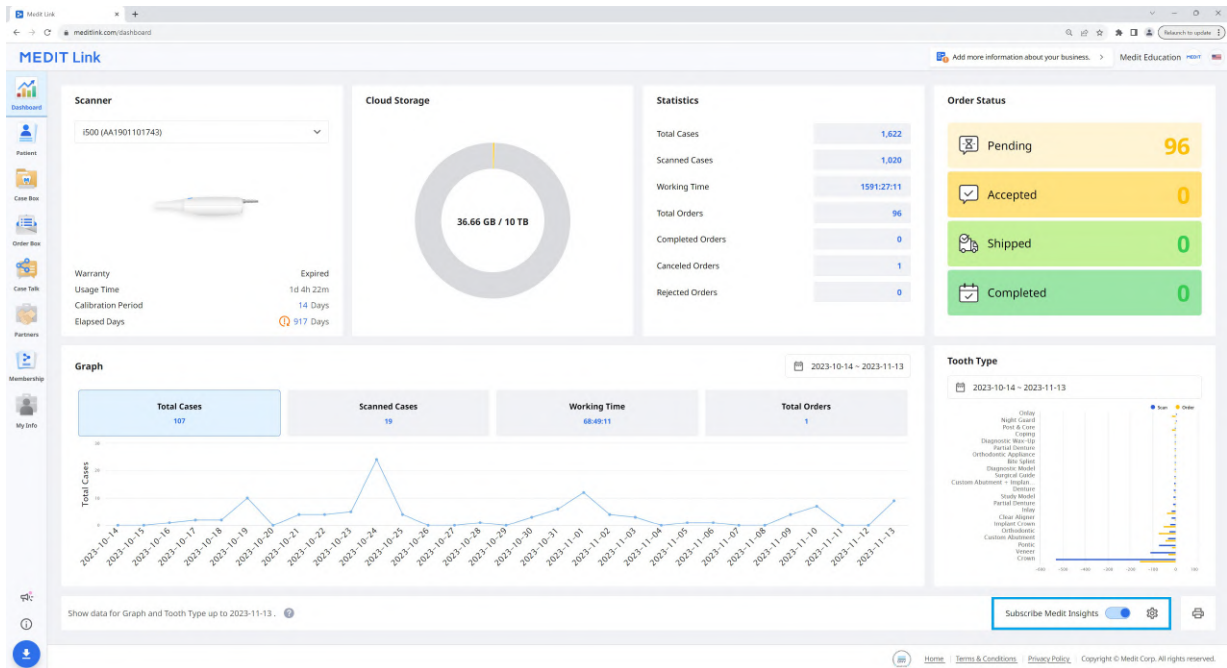

الاشتراك في Medit Insights

يمكنك تلقي بريد إلكتروني للتقرير في اليوم الثاني من كل شهر. لا يلزم إجراء عملية تسجيل إضافية. قم بتمكين "اشتراك في Medit Insights" فقط

إذا كنت لا تستخدم عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته لحساب Medit Link، فيمكنك تعيين عنوان بريد إلكتروني آخر لتلقي Medit Insights.

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account
 ☐ Another email address

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

في اليوم الثاني من كل شهر، ستصلك رسالة على البريد الإلكتروني تحتوي على الإحصائيات، كما هو موضح أدناه.

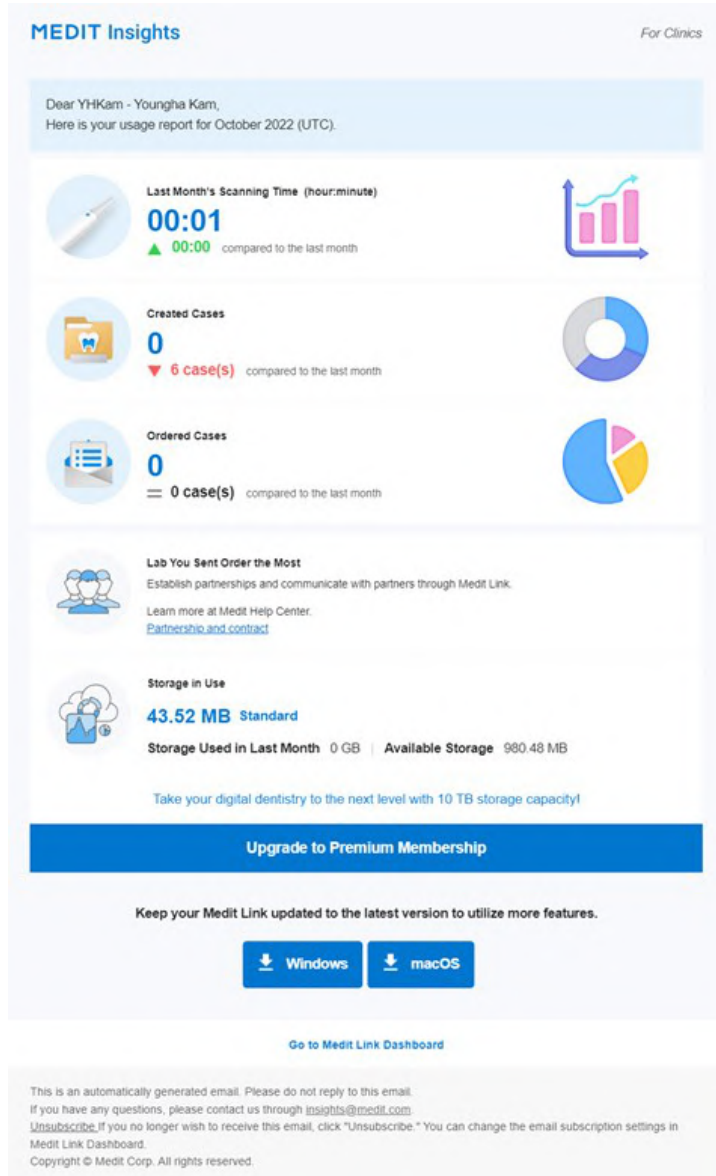

يوفر Medit نصائح ومعلومات مفيدة هنا. * إذا كنت لا تريد رؤية اللافتة، فقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار "اتفاقية التسويق والترويج" في معلوماتي < حسابي.	لافتة
يتم عرض معلومات الإحصائيات، مثل وقت المسح، والحالات التي تم إنشاؤها، والمختبر الأكثر طلبًا، وما إلى ذلك.	المعلومات الإحصائية
يوفر الزر رابط تنزيل Medit Link.	تنزيل Medit Link
تستند جميع المعلومات الإحصائية إلى معلومات الـ Dashboard الخاص بك. يمكنك رؤية المزيد من التفاصيل في الـ Dashboard.	Dashboard

إلغاء الاشتراك في Medit Insights

قم بتعطيل "الاشتراك في Medit Insights" في لوحة التحكم أو انقر على "إلغاء الاشتراك" في البريد الإلكتروني المستلم.

Patient

يمكنك إدارة الحالات بناءً على اسم المريض ورقم تعريف المريض.

يتم عرض جميع المرضى المسجلين من خلال تطبيق Medit Link في القائمة، مما يسهل إدارة المرضى وحالاتهم.

Patient Name ↑	Patient ID	Date of Birth	Gender	Last Scan Date	Registration Date
6	-	0001-01-01	-	-	2018-12-28 14:04
CAD	-	-	-	2021-02-24 12:03	2023-03-28 08:22
CaseB	-	-	-	2023-02-01 15:39	2023-04-13 17:54
Glidewell_fastdesign	Glidewell	-	-	2022-12-09 17:53	2022-12-09 17:47
HD Photo test	-	0001-01-01	-	-	2019-01-14 11:25
hk.lee	-	-	-	2022-03-31 16:44	2022-03-31 16:56
Multi Occlusion Normal Case	-	-	-	2023-02-02 16:30	2023-04-13 17:54
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35
Occlusion Test	-	0001-01-01	-	-	2021-10-13 21:35

البحث عن المرضى

1. حدد معايير البحث الخاصة بك بين اسم المريض أو رقم تعريف المريض من القائمة المنسدلة الموجودة أعلى يمين قائمة المرضى.

View Options

Patient ID ↑ Search Patient ID

Patient Name

Patient ID

2. أدخل اسم المريض أو رقم تعريف المريض للبحث وفقًا لمعايير البحث المختارة.
3. يتم عرض المرضى الذين لديهم الاسم أو الرقم التعريفي التي تم إدخالهم فقط في القائمة.

Case Box/Work Box

تظهر الـ Case Box (العيادة) أو الـ Work Box (المختبر) جميع الحالات التي أنشأها المستخدم في تطبيق Medit Link. يمكنك رؤية الملفات عبر متصفح الويب دون تثبيت برنامج منفصل.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a 'Case Box' dropdown menu set to 'Patient'. Below it are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The 'All' filter is selected. The interface shows 'Total Cases: 63' and a date range of '2023-08-05 - 2023-11-03'. A search bar is available for 'Case Name' and 'Case Name / Contains'. The main table lists cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. The table contains 10 rows of case data, including details like 'test's Case', 'wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone', and 'G11598492311021004395'.

فلتر الحالات

فلتر حسب المريض

يمكنك فلتر الحالات حسب المرضى. إنها مفيدة عندما تبحث عن حالات لمرضى محددين.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' dropdown menu is highlighted with a red box, showing the 'Patient' option selected. Below it are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. أدخل اسم مريض في حقل البحث.

The screenshot shows the search results for 'test' in the Case Box. The search bar contains 'test'. Below the search bar, there are several checkboxes and labels for different test types, including 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -', 'test_Initial / 0001-01-01 / - / -', 'Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -', 'test / - / - / -', and 'Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -'. A 'View More' link is visible at the bottom.

2. اختر مريضًا من قائمة نتائج البحث.

3. يتم عرض الحالات الخاصة بالمرضى المحددين فقط في القائمة، مما يسهل العثور على الحالات التي تريد العمل عليها.

الفترة حسب الحالة

☐ All ☒ Form Only ☐ Need Processing ☒ Scan Completed ☐ CAD ☐ Ordered ☐ Case Completed

- يتم توفير نوع الحالة التالي بناءً على نوع الحساب:

All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed	Case Box (العيادة)
All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done	Work Box (المختبر)

الفترة حسب المدة

يمكنك فلترة وعرض الحالات التي تم تعديلها خلال الفترة التي حددتها.

1. انقر على فلترة المدة.

 2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. حدد النطاق.

Last 30 Days ▾

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- الكل: إظهار كل الحالات.
 - النطاق المُخصص: حدد تاريخي البدء والانتها لعرض الحالات التي تم تعديلها خلال تلك الفترة.
 - اليوم: عرض الحالات التي عدّلت اليوم.
 - أمس: عرض الحالات التي عدّلت أمس.
 - آخر 7 أيام: عرض الحالات التي عدّلت خلال آخر 7 أيام، باستثناء اليوم.
 - آخر 30 يومًا: عرض الحالات التي عدّلت خلال آخر 30 يومًا، باستثناء اليوم.
 - آخر 90 يومًا: عرض الحالات التي عدّلت خلال آخر 90 يومًا، باستثناء اليوم.
 - هذا الشهر: عرض حالات هذا الشهر.
 - الشهر السابق: عرض حالات الشهر السابق.
- سيتم تحديث قائمة الحالات في الوقت الفعلي مع الحالات التي تم إنشاؤها أو آخر تعديل لها خلال المدة المحددة.

الفترة حسب البحث

يمكنك الاستفادة من إمكانيات البحث للبحث عن المعلومات المطلوبة بسهولة وسرعة.

Case Name ▾


Case Name / Contains

🔍

خيارات البحث بناءً على حساب العيادة/المختبر:

اسم الحالة، اسم المريض، رقم تعريف المريض، اسم المختبر	Case Box (العيادة)
اسم الحالة، اسم المريض، اسم العيادة، رقم تعريف الطلب	Work Box (المختبر)

تفاصيل الحالة

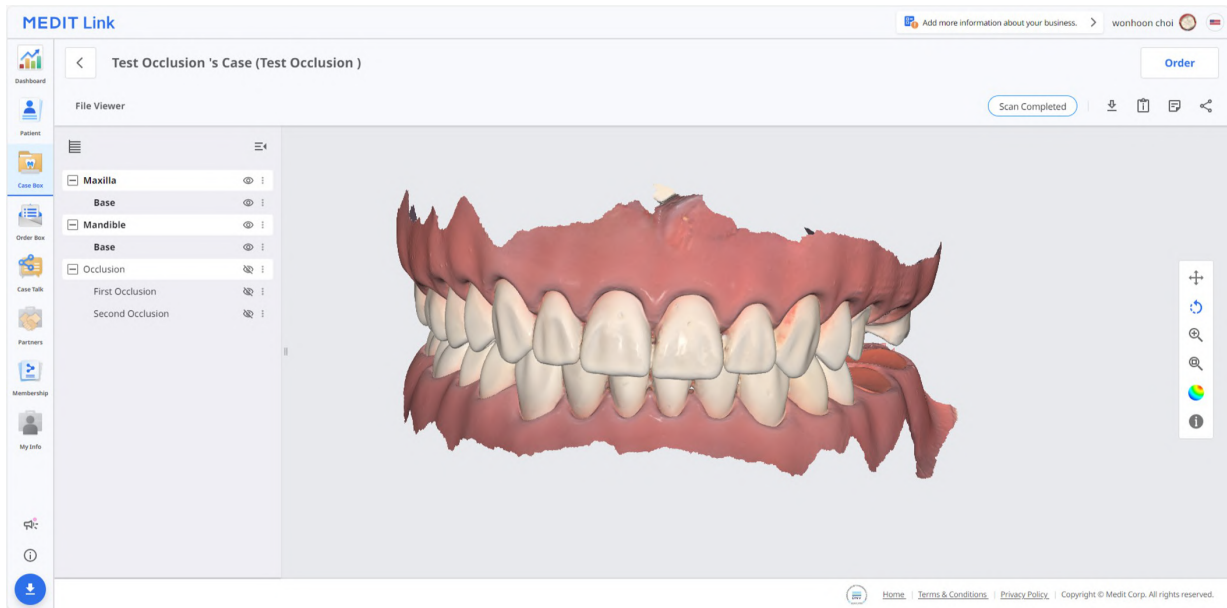

يتم توفير أدوات إدارة الحالة التالية في Case Box/Work Box.

حالة الحالة	عرض حالة الحالة.
انتقل إلى Case Box/Order Box	توفير اختصار للحالة نفسها في box آخر (Case Box ↔ Order Box ↔ Work Box). In Box ↔ Work Box.
تنزيل	تنزيل الملفات الموجودة في الحالة على جهاز الكمبيوتر المحلي.
معلومات الحالة	راجع تفاصيل الحالة واحفظها كملف PDF أو اطبعها.
المذكرة والعلامات	أضف مذكرة أو علامات عند التسجيل أو طلب حالة. استخدمها لتوصيل أي معلومات إضافية أو تكميلية عن الحالة لشركائك.
مشاركة	قم بإنشاء رابط للمشاركة. يمكن للمستخدمين الذين لديهم رابط مشترك الوصول إلى البيانات ثلاثية الأبعاد في مستعرض مثل Chrome أو Firefox أو Safari بدون تثبيت برامج إضافية.

Order Box/In Box

يعرض Order Box (العيادة) أو In Box (المختبر) الحالات المطلوبة في تطبيق Medit Link.

تفاصيل الطلب

1	إظهار اسم الحالة واسم المريض.
2	توفير وظائف لإدارة الطلبات (القبول/الإلغاء ؛ التسليم/الاستلام).
3	إظهار علامات التبويب المتاحة: الطلب، عارض الملفات
4	عرض وظائف لإدارة الحالات والملفات: حالة الحالة، الاختصارات للحصول على معلومات مفصلة، معلومات الحالة، المذكرة & العلامات، إلخ.
5	عرض المعلومات المفصلة للطلب بما في ذلك رقم الطلب، اسم المريض، اسم الشريك، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة & العلامات.
6	عرض معلومات المنتج المطلوب وحالة التسليم.


علامات التبويب في Order Box/In Box

الطلب	عارض الملفات
تحقق من المعلومات التفصيلية الخاصة بالطلب، مثل رقم تعريف الطلب، اسم المريض، اسم الحساب، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة والعلامات.	تحقق من الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة عمليات المسح/CAD. يعرض عارض الملفات ويدير النماذج ثلاثية الأبعاد والصور ثنائية الأبعاد التي تم الحصول عليها أو المرفقة.

Case Talk

يمكن مشاركة الحالات التي تم إنشاؤها في Medit Link مع أشخاص تحددهم، أو أي شخص لديه الرابط المشترك أو أعضاء مسجلين في Medit Link.

يمكن للمستخدم رؤية قائمة بجميع الحالات المشتركة من خلال "Case Talk" في تطبيق Medit Link و موقع Medit Link.

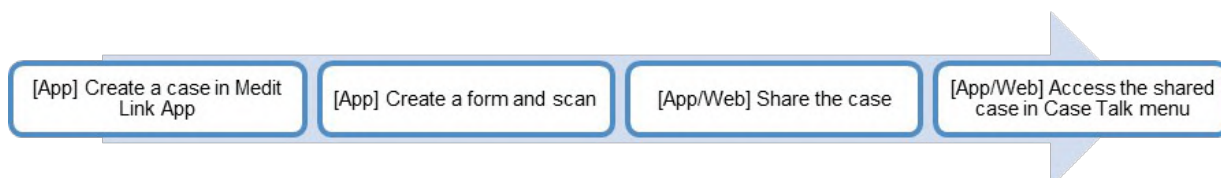

يمكن عرض الحالات المشتركة عبر مستعرض ويب دون تثبيت برنامج منفصل، مما يتيح سهولة الاتصال عبر البيانات ثلاثية الأبعاد على أجهزة مختلفة.


إنشاء Case Talk

يمكنك إنشاء رابط مشترك لحالة تم إنشاؤها في Case Box/Work Box.

1. ابحث عن حالة تريد مشاركتها وانقر على الزر "مشاركة" على اليمين.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Share
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share

2. حدد الملفات التي تريد مشاركتها.

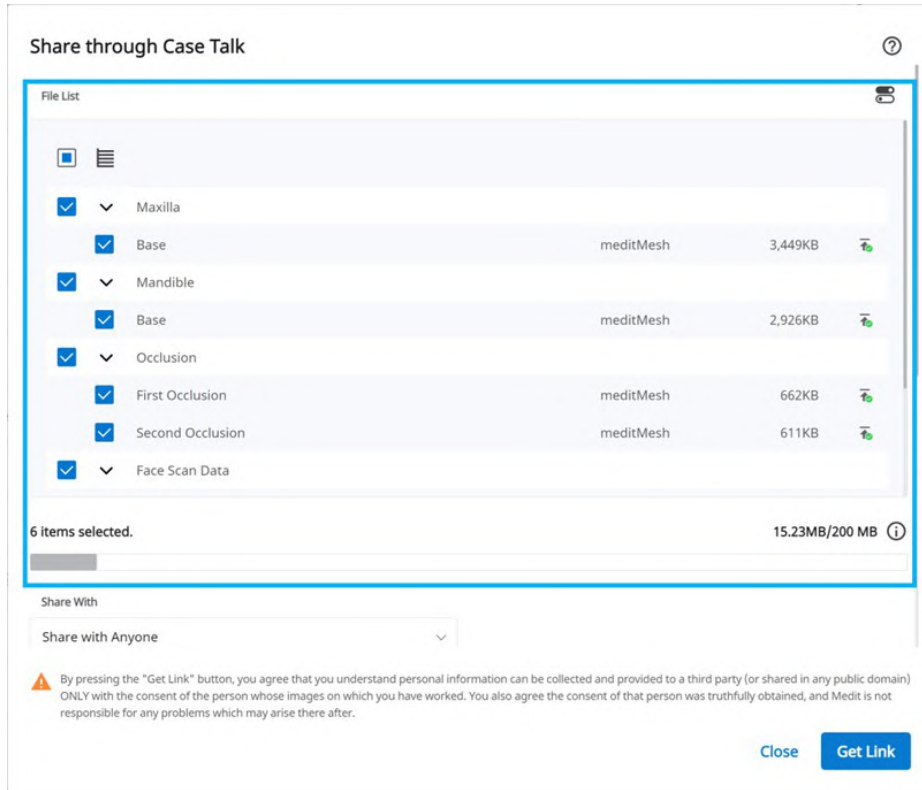

3. قم بتعيين نوع إذن المشاركة وخيارات المشاركة.
4. انقر على "الحصول على رابط" لإنشاء رابط مشترك.

تحديد نوع إذن المشاركة وخيارات المشاركة

Share through Case Talk



Share With

Share via

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

PIN Code

☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

☒ Allow comments

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.
 The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.
 If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.


Close

Get Link

المشاركة مع أي شخص لإنشاء رابط مشترك. يمكنك مشاركة الملفات مع أي شخص.	المشاركة مع
المشاركة مع أشخاص معينين لإنشاء ارتباط مشترك وإرساله إلى أشخاص محددين.	
إذا حددت "مشاركة مع أشخاص معينين"، فيمكنك مشاركة الرابط مع أشخاص معينين بطرق مختلفة.	المشاركة عبر
عنوان البريد الإلكتروني رسالة قصيرة الشركاء	
تحديد تاريخ انتهاء صلاحية الرابط. بعد انتهاء صلاحية الرابط، لن يتمكن الأشخاص الذين شاركته معهم من الوصول إلى الملفات. يمكنك تمديد فترة الصلاحية حتى 90 يومًا ابتداءً من اليوم.	تاريخ انتهاء الصلاحية
قم بتعيين رمز وصول مكون من 6 أرقام لضمان أمان البيانات.	الرقم السري
إذا حددت هذا الخيار، فسيرى جميع الأشخاص الذين لديهم الرابط اسم المريض.	مشاركة اسم المريض
إذا قمت بتحديد هذا الخيار، سيتمكن جميع المستخدمين الذين لديهم الرابط من تنزيل الملفات.	منح إذن التنزيل
- إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فستتمكن من التواصل من خلال الرابط المشترك. - إذا قمت بإلغاء تحديد الخيار، سيتمكن المستلم من عرض تعليقاتك فقط ولكن لن يتمكن من إضافة تعليقاته الخاصة.	السماح بالتعليقات
يمكنك ترك رسالة في قسم التعليقات.	التعليق

Case Talk تفاصيل

يمكنك رؤية الملفات في الحالة المتشاركة. تتوفر الوظائف التالية في صفحة تفاصيل Case Talk.

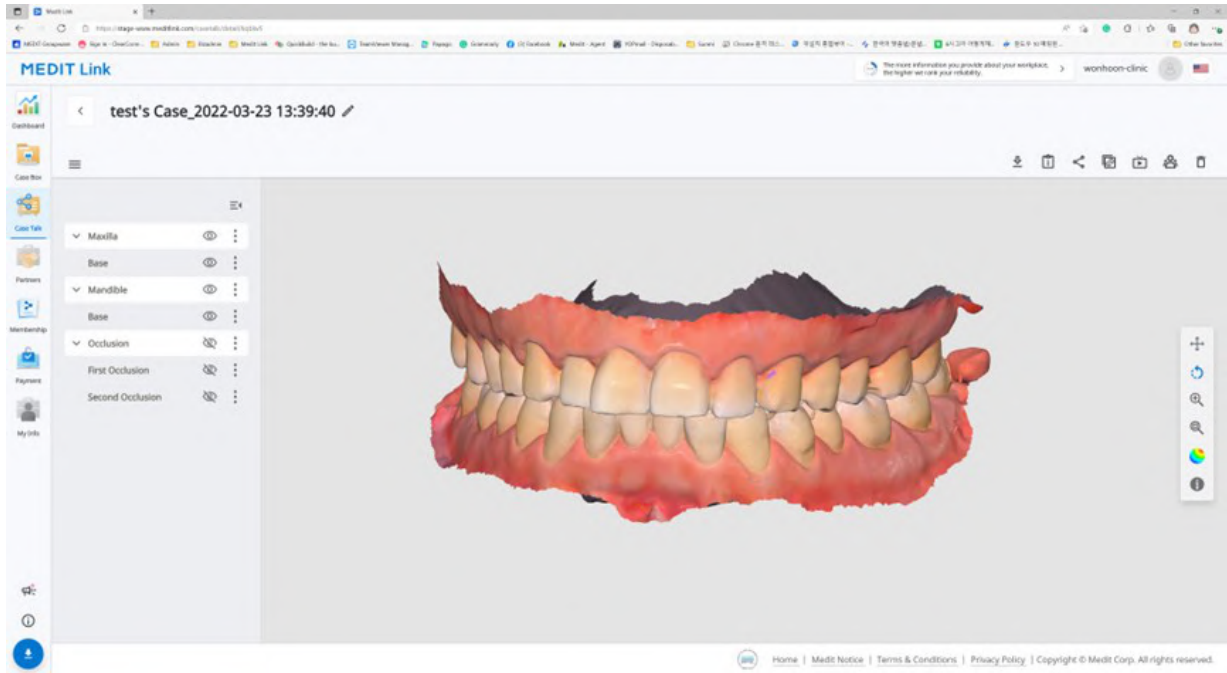

قم بتنزيل جميع الملفات في الحالة على جهاز الكمبيوتر المحلي.	تنزيل	
عرض معلومات مفصلة عن الحالة.	معلومات الحالة	
تعديل إعدادات المشاركة.	مشاركة	
انسخ الرابط المشترك إلى الحافظة. يظهر الرابط المنسوخ الملفات المشتركة على متصفح الويب الخاص بك.	نسخ الرابط	
شارك شاشتك مع المستخدمين المتصلين. تتم مزامنة مشاركة الشاشة مع المستخدمين المتصلين.	بث مباشر	
إظهار كافة المستخدمين الذين يدخلون الرابط المشترك.	الحاضرين	
حذف الرابط المشترك. لم يعد الرابط المشترك المحذوف قابلاً للوصول.	حذف	

ملحوظة


الخدمات التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- بث مباشر
- الحاضرين

Web Viewer

يمكنك عرض البيانات المشتركة من خلال Case Talk في متصفح الويب.

من الممكن التواصل مع الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الرابط باستخدام الملاحظات والتعليقات.

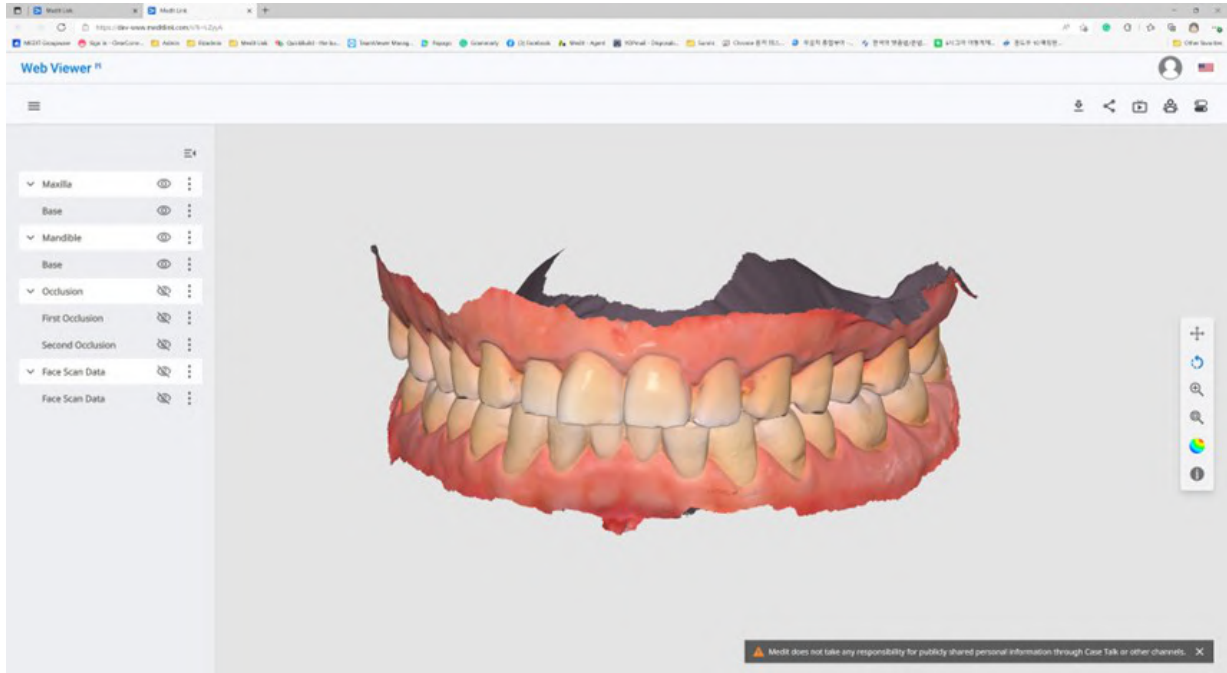

تحميل جميع ملفات هذه الحالة على جهاز الكمبيوتر.	تحميل	
عرض معلومات مفصلة عن الحالة.	معلومات الحالة	
تعديل إعدادات المشاركة.	مشاركة	
شارك شاشتك مع المستخدمين المتصلين. تتم مزامنة مشاركة الشاشة مع المستخدمين المتصلين.	بث مباشر	
إظهار كافة المستخدمين المتصلين بالرابط المتشارك.	الحاضرين	
تغيير نظام ترقيم الأسنان.	ترقيم الأسنان	


ملحوظة

الخدمات التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- بث مباشر
- الحاضرين

التعليق

يمكنك إضافة تعليقات توضيحية إلى موقع محدد على النموذج ثلاثي الأبعاد. يمكن لأي شخص لديه الرابط عرض التعليقات التوضيحية التي تضيفها.

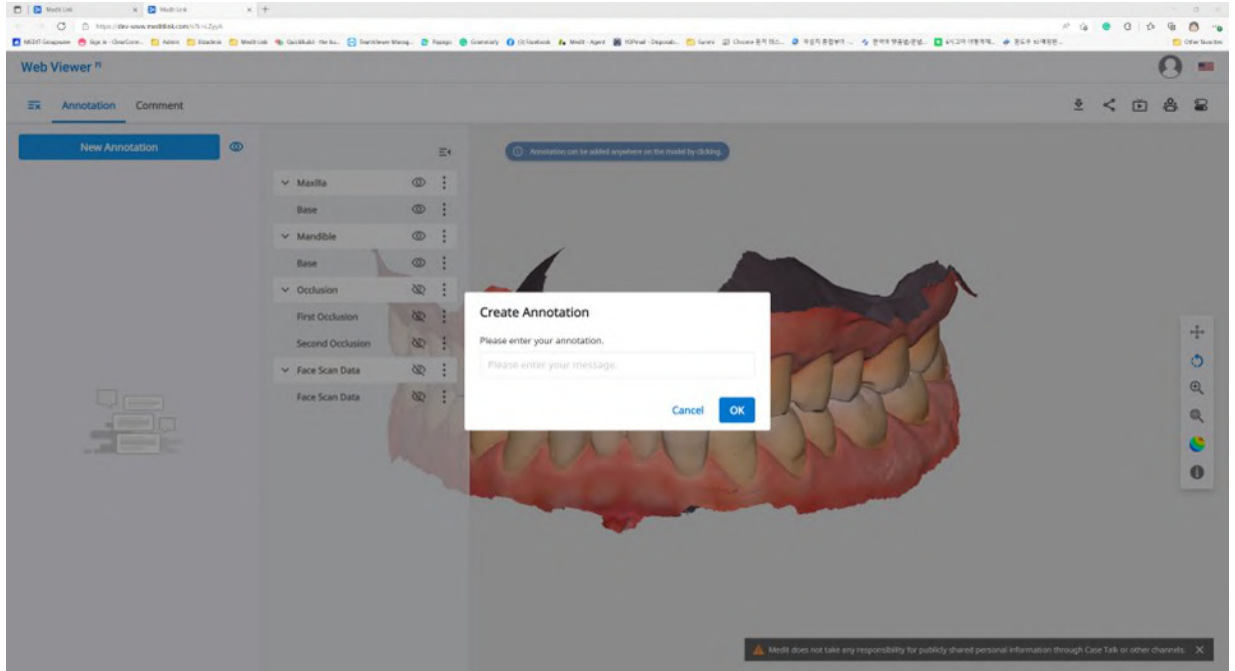

ملحوظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

• التعليق

1. ابحث عن رمز القائمة أعلى الزاوية اليسرى وحدد علامة التبويب "تعليق". استخدم زر "تعليق جديد" لإضافة تعليق توضيحي في أي مكان على البيانات بنقرة واحدة.
2. اكتب الرسالة، ثم انقر على "OK" لحفظها.

Create Annotation

Please enter your annotation.

CancelOK

3. يمكنك استخدام التعليقات التوضيحية كقناة اتصال بسيطة. انقر على التعليق التوضيحي الذي تم إنشاؤه لإدخال الرد واضغط على "إرسال".

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi  

Annotation 1

1

09-09 20:31

Send

التعليقات

يمكنك التواصل مع المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى الرابط من خلال علامة التبويب "تعليق" في قائمة الـ Web Viewer.

ملحوظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- التعليق

مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي


يمكنك مشاركة شاشتك في الوقت الفعلي.

ملحوظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- بث مباشر

1. انقر على "بث مباشر" لمشاركة شاشة الـ Web Viewer مع المستخدمين المتصلين.

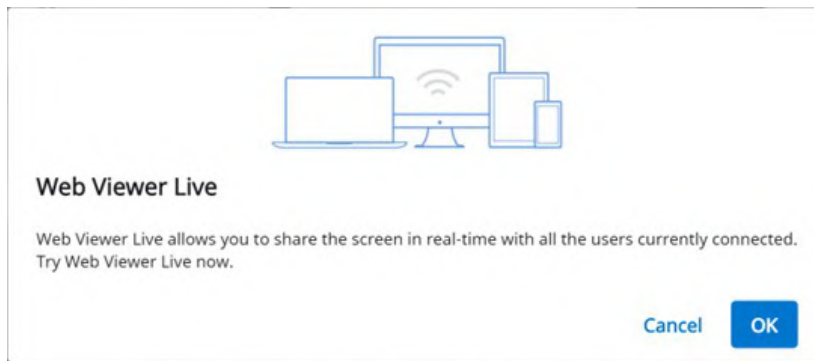

2. انقر على "OK" لبدء مشاركة شاشتك.

3. يجب على الأشخاص الآخرين الذين قاموا بالوصول إلى الرابط قبول مشاركة الشاشة.

4. يتم عرض شاشة المستخدم الذي بدأ مشاركة الشاشة متزامنة مع شاشة الشخص الذي استلم الطلب.

شجرة البيانات

يتم تجميع جميع البيانات وعرضها وفقًا للسماح الموجودة في شجرة البيانات. يمكنك إظهار البيانات أو إخفاؤها، وضبط العتامة، وما إلى ذلك.

التحكم بشجرة البيانات

إظهار/إخفاء	انقر على رمز العين لإظهار البيانات أو إخفاؤها من العرض. تحكم في رؤية البيانات كمف مجموعة أو فردي.
العتامة	قم بتمرير الفأرة فوق عنصر مرئي لرؤية شريط تمرير التعتيم. اضبط شريط التمرير لتغيير شفافية بياناتك.

preoperationmaxillary.meditMe

يتم توفير القائمة الموسعة على الجانب الأيمن من كل عنصر من عناصر شجرة البيانات. تتضمن الخيارات التالية:





قائمة موسعة

- إظهار هذا فقط: إخفاء كافة البيانات باستثناء البيانات الحالية.
- إخفاء: إخفاء البيانات الحالية.

ضوابط النموذج ثلاثي الأبعاد

تحريك النموذج.	تحريك كامل	
تدوير النموذج.	تدوير	
تكبير وتصغير النموذج.	التكبير/التصغير	
وضع النموذج في وسط الشاشة.	التكبير مع الملاءمة	
إظهار البيانات بألوان نسيج حقيقية.	النسيج مفعّل	
إظهار البيانات بلون واحد.	النسيج غير مفعّل	
	وضع عرض النموذج	

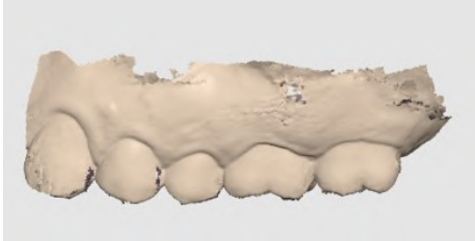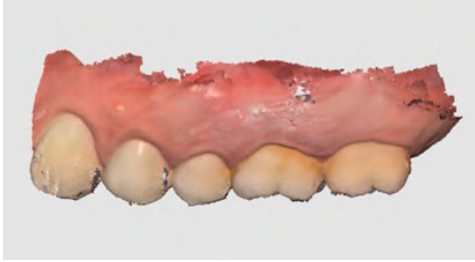

Partners

يمكنك البحث عن شركاء محتملين لطلب الشراكة والاطلاع على قائمة الشركاء الحاليين.


ملحوظة

الخدمات التي تستخدم Google Maps غير متوفرة على Medit Link China.

البحث عن شركاء


يمكنك البحث عن مستخدمي Medit Link بناءً على اسم الشركة و/أو العنوان.

في نتائج البحث، يمكنك إرسال طلب شراكة إلى الشركة التي ترغب في العمل معها.

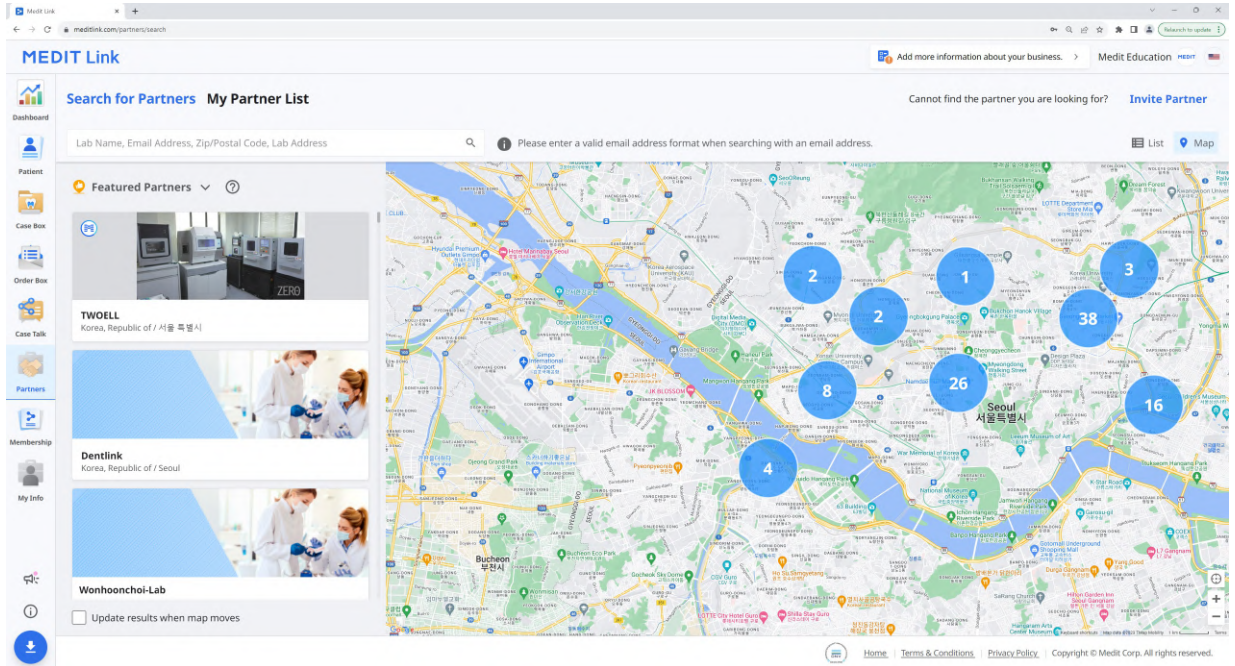

قائمة شركائي

يمكنك مراجعة شراكاتك الحالية مع جميع شركائك الحاليين في قائمة شركائي.

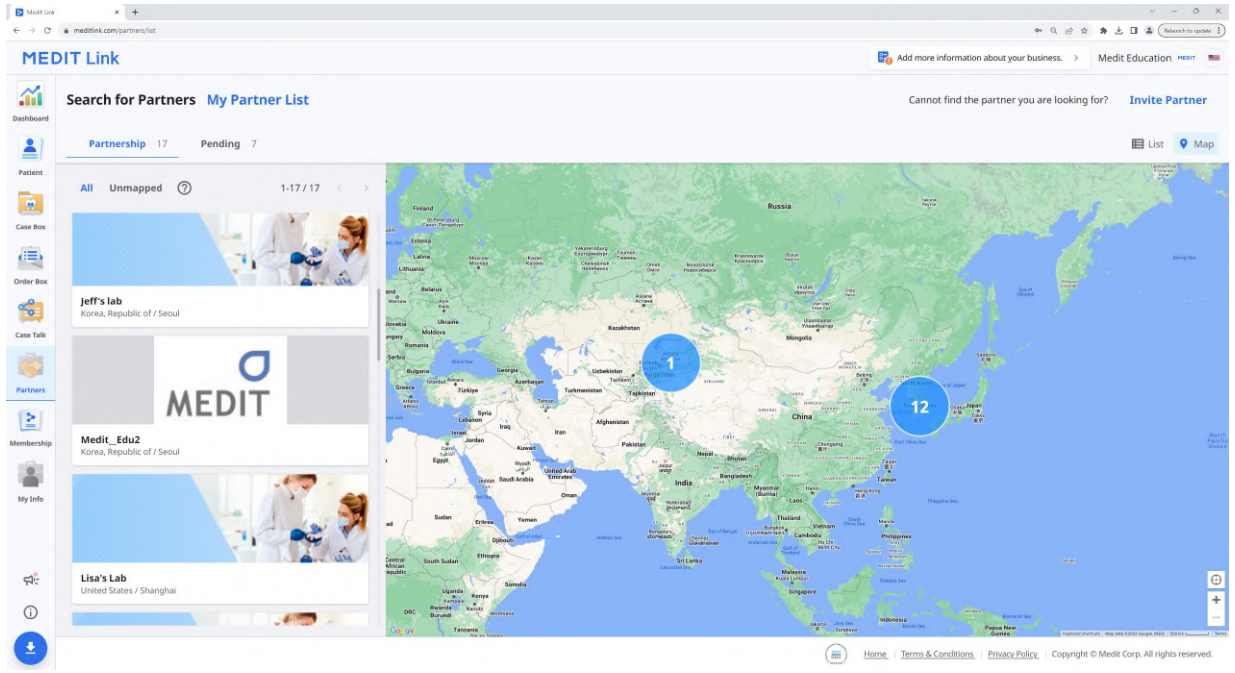

دعوة شركاء

إذا كان هناك عيادة أو مختبر ترغب في العمل معه، يمكنك دعوتهم للانضمام إلى Medit Link. سيتم تشكيل الشراكة تلقائيًا بمجرد قبول الدعوة.

1. انقر على "دعوة شريك" في الجزء العلوي الأيسر من شاشتك.
2. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للشركة التي ترغب في العمل معها وأرسل لها دعوة مع طلب شراكة.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

3. بمجرد قبول المنظمة المدعوة الدعوة والاشتراك في Medit Link، سيتم إنشاء الشراكة تلقائيًا.

Membership

تهدف سياسة عضوية Medit Link إلى إنشاء بيئة رقمية أكثر اتساعًا، والتوسع تدريجيًا لتقديم خدمات متنوعة تعتمد على النظام الأساسي السحابي.

نهدف إلى تزويد عملائنا بتجربة أكثر اتساقًا وتخصيصًا من خلال سياسة العضوية الجديدة الخاصة بنا.

نقدّم نوعي خطط عضوية:

إعتيادي

- خطة إعتيادية مجانية لجميع المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول
- 1 GB من التخزين السحابي
- للمستخدمين الجدد

Premium

- خطة اشتراك مدفوعة
- 10 TB من التخزين السحابي
- للمستخدمين ذوو الحالات المتعددة والبيانات المختلفة
- نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد

Premium	إعتيادي	
TB 10	GB 1	التخزين السحابي
0.99\$ في الشهر	مجاني	الرسوم الشهرية
* لا يحسب التخزين السحابي المساحة التي تشغلها البيانات الأولية.		

ملحوظة

ستكون خطط العضوية متاحة على Medit Link China. يمكنك الحصول على خطة Premium مجانًا حتى الإصدار الرسمي للميزة.

عضوية

خطتي

في القسم الموجود على الجانب الأيسر، يمكنك رؤية خطة عضويتك الحالية. يمكنك أيضًا تغيير اشتراك عضويتك في أي وقت.

My Plan

Standard

Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

Subscribe

التخزين السحابي

في القسم الأيمن، يمكنك إدارة التخزين السحابي الخاص بك.

Cloud Storage

Set Period

2018-01-01 – 2021-10-07

All

1 Week Ago

1 Month Ago

6 Month Ago

1 Year Ago

☐ Total Selected 0.00 KB

Delete

☐ Raw Data 147.52 GB
 Remove raw data.
 Raw data does not take up space in cloud storage.

☐ Result Files & Attachments 13.74 GB
 Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

قم بتعيين الفترة التي يتم حذف البيانات بعدها.

- الكل: رؤية كل الملفات.
- منذ أسبوع واحد: رؤية الملفات التي مرّ أسبوع على إنشائها.
- منذ شهر واحد: رؤية الملفات التي مرّ شهر على إنشائها.
- منذ 6 أشهر: رؤية الملفات التي مرّت ستة أشهر على إنشائها.
- منذ عام واحد: رؤية الملفات التي مرّ عام على إنشائها.


الفترة المحددة

البيانات الخام	لا تشغل البيانات الأولية مساحة في التخزين السحابي، لذلك لن تكون في الدائرة البيانية. ولكن يمكنك إدارة البيانات الخام من هنا إذا لزم الأمر، على سبيل المثال، حذفها لحماية معلومات المريض الخاصة.
النتائج & المرفقات	تشغل ملفات النتائج والمرفقات مساحة في السحابة. إذا كانت السحابة ممتلئة، يمكنك تأمين المزيد من مساحة التخزين عن طريق إزالة الملفات غير الضرورية.
حذف	قم بإزالة الملفات المحددة من التخزين السحابي لتحرير مساحة.

الاشتراك


إذا كنت تستخدم حاليًا الخطة الإعتيادية أو الPremium برمز استرداد، فيمكنك الاشتراك في عضوية Premium. يتم الدفع من خلال خدمة Stripe (www.stripe.com).

1. انقر على الزر "اشتراك".

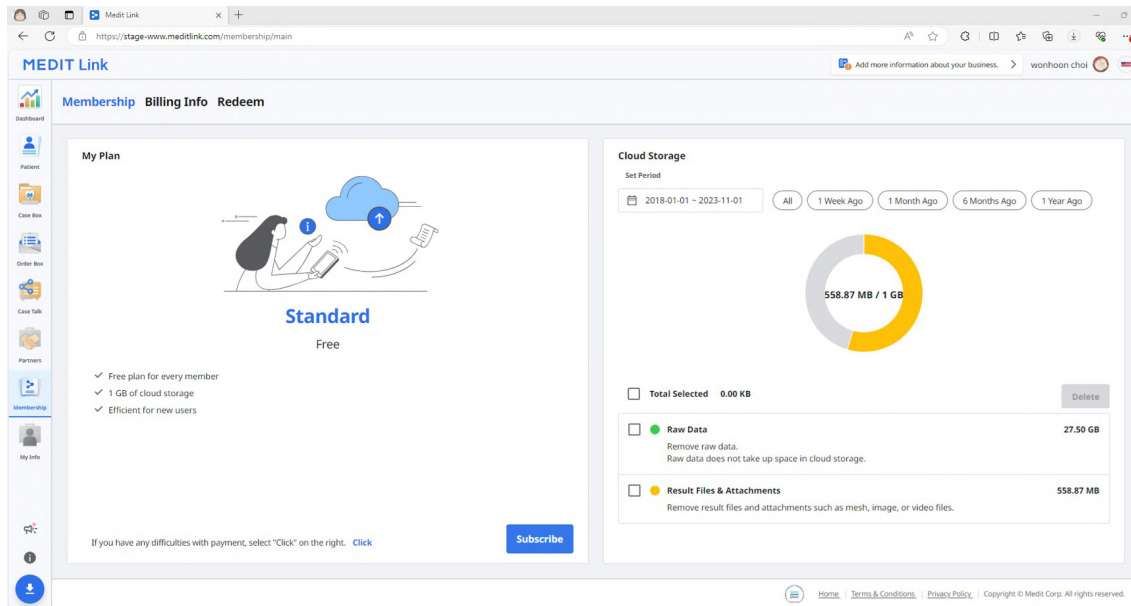

2. تحقق من وصف خطة Premium وانقر على "اشتراك" مرة أخرى.

Subscribe Membership

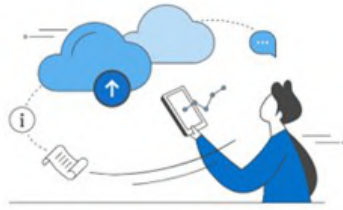

Premium

0.99\$ USD / Monthly

1 Month Free - for the first subscription!

- ✓ A subscription plan
- ✓ 10TB cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial after subscription

* VAT not included

Cancel

Subscribe

3. تحقق من السعر والشروط وأدخل المعلومات اللازمة للدفع. بعد ذلك، انقر على "اشتراك".

← MEDIT Link TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic \$0.99
Billed daily

Subtotal \$0.99

1 MONTH FREE – for first subscription -\$0.99
100% off for a day

Total due today \$0.00

Powered by stripe | Terms Privacy

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234

VISA

MM / YY

CVC

Name on card

Country or region

South Korea

☐ Save information to pay faster next time

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

4. قد يستغرق الدفع عدة ثوان. عند الانتهاء، ستري رسالة التأكيد.

Subscribe Membership



Payment Successful.

Invoice

Close

إلغاء الاشتراك

يمكنك إلغاء الاشتراك من العضوية في أي لحظة. بعد إلغاء الاشتراك، سيظل بإمكانك استخدام عضوية Premium للأيام المتبقية من الشهر المدفوع. سيتم تغيير خطتك إلى إعتيادية اعتبارًا من يوم الدفع التالي، وستقتصر مساحة التخزين السحابية على 1 GB. إذا تم تجاوز سعة التخزين السحابية، فلن يتم نسخ الملفات احتياطيًا، ولن تتوفر وظائف الطلب والمشاركة.

1. انقر على "إلغاء الاشتراك".

My Plan



Premium

Free

The first month is free if you join the membership.

- ✓ A paid plan
- ✓ 10 TB of cloud storage
- ✓ Efficient for users with many cases and various data
- ✓ One-month free trial included

The following payment date is 2023-11-30. [View More](#)
If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

[Unsubscribe](#)

2. انقر على "إيقاف الاشتراك".

Cancel Subscription



Premium

In Use



Standard

Free

Are you sure you want to unsubscribe?

- ✓ A free plan for every member
- ✓ 1GB cloud storage
- ✓ Efficient for new users

[Cancel Subscription](#) [Stay Subscribed](#)

3. لتأكيد رغبتك في إلغاء الاشتراك، انقر على "إلغاء الاشتراك" مرة أخرى في النافذة المنبثقة الجديدة.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

[Cancel Subscription](#)

[Stay Subscribed](#)

4. تم إلغاء اشتراكك.

5. سيتم تغيير خطتك إلى إعتيادية اعتبارًا من يوم الدفع التالي، وستقتصر مساحة التخزين السحابية على 1 GB. إذا تم تجاوز سعة التخزين السحابية، فلن يتم نسخ الملفات احتياطيًا، ولن تتوفر وظائف الطلب والمشاركة.

Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.

Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.

If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

[Close](#)

معلومات الفواتير

يمكنك التحقق من سجل الدفع لاشتراكات العضوية، بما في ذلك فاتورة لكل دفعة. يمكنك أيضًا إضافة أو تغيير طريقة الدفع، والتي سيتم تطبيقها بدءًا من الدفعة المجدولة التالية.

[Membership](#) [Billing Info](#) [Redeem](#)

My Plan and Billing Information

Plan: Premium

Amount: 0.99\$ USD / Monthly

Next Payment Date: 2021-09-09

Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

كيفية إضافة طريقة دفع

1. انقر على "تعديل طريقة الدفع".

[Membership](#) [Billing Info](#) [Redeem](#)

My Plan and Billing Information

Plan: Premium

Amount: 0.99\$ USD / Monthly

Next Payment Date: 2021-09-09

Payment Method: Visa *****4242 (11/21) | Stripe [Edit Payment Method](#)

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

2. انقر على "إضافة طريقة دفع."

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default Expires 11/2021

+ Add payment method

3. أدخل المعلومات المطلوبة وانقر على "أضف."

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. سيتم تعيين طريقة الدفع المضافة كطريقة افتراضية واستخدامها للدفع التالي.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556 Default Expires 11/2021 ×

VISA **** 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

كيفية تغيير طريقة الدفع

1. انقر على رمز القائمة الموسعة بجوار طريقة الدفع التي تريد تغييرها في نافذة حوار الفوترة.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556	Default	Expires 11/2021	×
VISA **** 4242		Expires 11/2021	...
+ Add payment method			

2. انقر على "جعله افتراضيًا" لتعيين البطاقة المحددة كطريقة الدفع الافتراضية.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day
Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS

VISA **** 5556	Default	Expires 11/2021	×
VISA **** 4242		Expires 11/2021	...
+ Add payment method			

Make default

Delete


BILLING INFORMATION

الاسترداد

قم بتسجيل رمز الاسترداد المقدم كجزء من العرض الترويجي. يمكنك استخدام عضوية Premium مع رمز الاسترداد.

تسجيل رمز الاسترداد

1. أدخل رمز الاسترداد وانقر على "تسجيل".

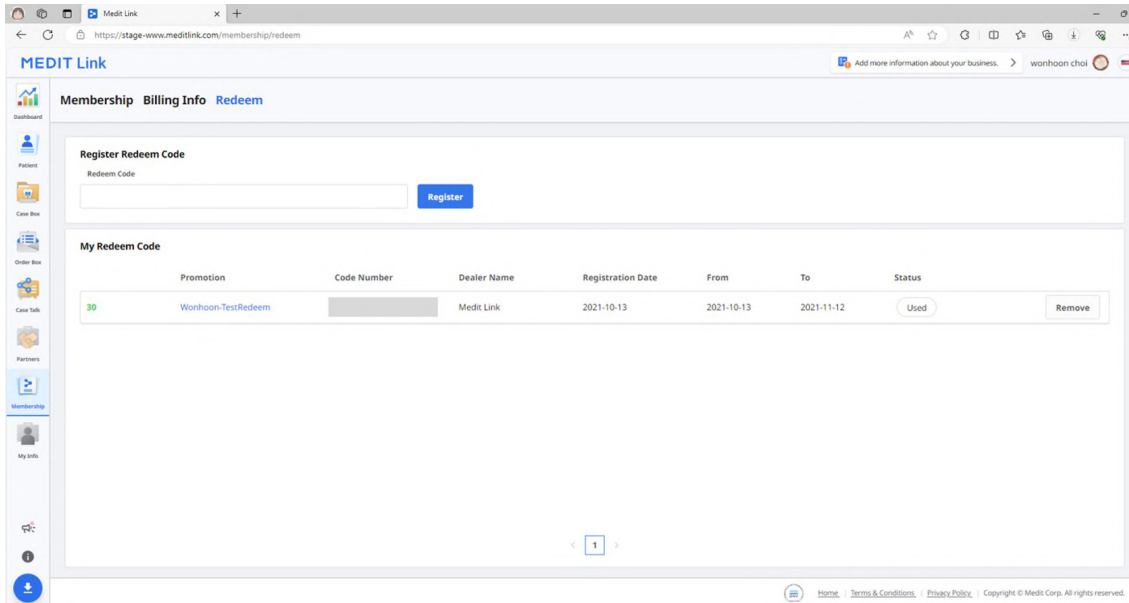

2. اقرأ الإشعار واختر "تسجيل" أو "تطبيق" في مربع الحوار المنبثق.
- تسجيل: قم بتسجيل رمز الاسترداد. يمكنك تفعيل واستخدام رمز الاسترداد لاحقاً بعد التسجيل.
 - تطبيق: سجل وقم بتفعيل رمز الاسترداد. ينطبق الخصم الترويجي على الفور.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately. Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion. Periodic payments are stopped automatically.

Close
Register
Apply

تفعيل رمز الاسترداد

يمكنك تسجيل رموز استرداد متعددة، لكنك تحتاج إلى تفعيل الرمز الذي تريد استخدامه.

1. انقر على الزر "تفعيل" بجوار الرمز الذي تريد استخدامه.
 - إذا لم يكن هناك رمز بالحالة "Activated"، فسيتم تطبيق الرمز الذي تختاره على الفور.
 - في حالة وجود رمز بالفعل بالفعل، يتغير الرمز المحدد حديثاً إلى حالة "Waiting". عندما تنتهي صلاحية رمز الاسترداد المنشط حالياً، سيتم تفعيل رمز الاسترداد الجديد في حالة "Waiting" تلقائياً.

ملحوظة

يمكن تفعيل رمز استرداد واحد فقط، ويمكن أن يكون رمز استرداد واحد فقط في حالة "Waiting".

My Info

حسابي

يمكنك مراجعة وتعديل المعلومات التي قدمتها أثناء التسجيل والتحقق من حالة عضويتك.

MEDIT Link

[My Account](#) [My Clinic](#) [My Scanner](#)

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Account Information



Email Address

wonhoon.choi@medit.com

Change Email Address

Password

Change Password

Last Modified Date: 2019-09-03 08:46:05

Name

wonhoon choi

Language

한국어 (대한민국)

Country

Korea, Republic of

Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information

Subscribe

عيادتي/مختبري (حساب المشرف فقط)

يمكنك مراجعة وتعديل المعلومات المتعلقة بعيادتك أو مختبرك. هذا القسم متاح فقط لحسابات المشرف.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account My Clinic My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.

We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

الماسح الضوئي الخاص بي

يمكنك التحقق من معلومات الجهاز المتصل للحساب.

MEDIT Link

Add more information about your business. > seolah jeon

My Account My Clinic My Scanner

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Date	Days Left	
1	i500	-	-	-	-	-	-	-	
2	i500	AA1911104453	0d 7h 18m	2023-04-14 12:48	2020-02-14 15:49	2019-12-02	2021-06-01	Expired	
3	i500	AA1911104480	0d 0h 49m	-	2019-11-26 16:33	2019-11-19	2021-05-18	Expired	
4	i500	AA1911104481	0d 5h 12m	-	2021-02-16 12:37	2019-11-21	2021-05-20	Expired	
5	i700	AZ2105102622	0d 8h 15m	2022-09-21 12:09	2022-09-15 11:25	2021-07-09	2022-07-08	Expired	Buy
6	i700w	BF2112100021	0d 7h 4m	2023-04-03 17:42	2023-03-07 17:29	-	-	-	Buy
7	i700w	BF2202100048	19152d 22h 15m	2023-04-03 18:30	2023-03-24 10:35	-	-	-	Buy
8	i600	BG2202100024	0d 5h 47m	2023-07-31 16:10	2023-06-26 13:43	2022-03-30	2023-03-29	Expired	Buy
9	i600	BG2202100026	0d 5h 40m	2022-09-05 16:34	2022-08-11 11:25	-	-	-	Buy
10	i600	BG2202100029	0d 3h 10m	2022-08-10 11:05	2022-06-16 11:58	-	-	-	Buy

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home Terms & Conditions Privacy Policy Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

50

قوائم أخرى

الإخطارات & التحديثات

يمكنك التحقق من الإخطارات الهامة من Medit و تحديثات برنامج Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

معلومات عن Medit

يمكنك الحصول على معلومات مختلفة حول استخدام Medit Link. قم بالوصول إلى موارد Medit التعليمية والإعلامية، مثل Medit Academy و Medit Academy YouTube و مركز مساعدة Medit.

Need more help?



Medit Academy >



YouTube >




Help Center >

تنزيل تطبيق Medit Link

يمكنك تنزيل أحدث إصدار من مثبت البرنامج من الويب. هذه القائمة مفيدة عندما تفقد المثبت المتوفر في حزمة المنتج، أو إذا كان لديك مثبت قديم.

يتم تحديث Medit Link تلقائيًا عندما تكون متصل بالإنترنت.

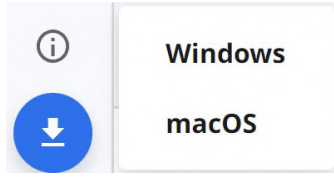

نظرة عامة

MEDIT Link 3.2.0

Patient

Total Patients: 94

All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date ↓
1. Aria	1234567890123456789012...			1	2023-10-19	2023-10-26
1.Fanta 2				1	2023-10-24	2023-10-24
1.First.A	210123	F	2021-01-23	0	2023-10-19	
1.Alexa				0	2023-10-19	
1.Cola		F	1974-05-25	0	2023-10-24	
1.Cyder		M	1966-12-31	0	2023-10-24	
1.Orange				0	2023-10-24	
1.Melon				0	2023-10-24	
231020D444				1	2023-10-20	2023-10-20
231020A111_edit	231020A111	F	1985-02-13	1	2023-10-20	2023-10-20
2.Second.B	941011	F	1994-10-11	0	2023-10-19	

1	شريط العنوان	الرجوع إلى تطبيق Medit Link < شريط العنوان للحصول على معلومات مفصلة.
2	القائمة	الرجوع إلى تطبيق Medit Link < القائمة للحصول على معلومات مفصلة.
3	الأدوات والوظائف	الرجوع إلى تطبيق Medit Link < عارض الملفات و تطبيق Medit Link < خيارات العرض للحصول على معلومات مفصلة.
4	قائمة الحالات	الرجوع إلى تطبيق Medit Link < التصفية والبحث للحصول على معلومات مفصلة.

يلخص الجدول أدناه القوائم المتوفرة في كل نوع من حسابات العيادات والمختبرات.

App Box	Trash Box	Case Talk	Work Box	In Box	Order Box	Case Box	Patient	نوع الحساب	
O	O	O	X	X	O	O	O	المشرف	حسابات العيادة
O	O ميزة* الاستعادة فقط	O	X	X	X	O	O	العضو	
O	O	O	O	O	X	X	X	مشرف	حسابات المختبر
O	O ميزة* الاستعادة فقط	O	O	X	X	X	X	عضو	

شريط العنوان

يوفر شريط العنوان وصولاً سريعاً إلى ميزات مثل معلومات الحساب، الإشعارات، الملاحظات والتحديثات، الإعدادات وحالة الشبكة.



My Information

تحتوي معلوماتي على معلومات المستخدم الأساسية مثل صورة الملف الشخصي، اسم العيادة أو المختبر، عنوان البريد الإلكتروني واسم المستخدم.

My Information



Clinic Name

Medit_Edu

Email Address

edu@medit.com

Name

Medit Education

Log Out

Close

إشعارات

يمكنك رؤية الإشعارات المتعلقة بالشركات، الطلبات وإجراءات العمل.

Notification

1
☐ Display Unread Messages Only
Mark All As Read

2

Delivery
2020-08-20 오후 5:20

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

Order
2020-08-20 오후 5:18

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order
2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order
2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order
2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order
2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Work
2020-08-14 오후 6:33

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

Work
2020-08-14 오전 10:15

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

Close

1	حدد المربع لعرض الرسائل غير المقروءة فقط.
2	انقر على أي إشعار للانتقال على الفور إلى الحالة أو صفحة الويب ذات الصلة.

الإخطارات & التحديثات

يمكنك التحقق من الإخطارات الهامة من Medit وتحديثات برنامج Medit.

الإعدادات

يتيح مربع حوار الإعدادات للمستخدمين تكوين البرنامج.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

General

Save Folder

C:/ProgramData/Medit/Medit Link/Data/

Language Settings

English

Teeth Labeling

☒ FDI
☐ US

Notification

☒ Allow Notifications

Upload Raw Data

☒ Upload Automatically

Quick Scan

Choose if you would like to have the scan stages below automatically appear in Medit Scan for Clinics without having to fill in the form information.

☐ Pre-Op for Maxilla, Pre-Op for Mandible, Face Scan

Viewing Options

☒ Advanced Rendering

Adjust Color Texture

Medit User Experience Improvement Program

We value your feedback! Join the Medit User Experience Improvement Program and share your thoughts. The collected information will be used to improve the product and services. Medit Link does not collect any information that identifies individuals.

Please apply changes.

Apply

يرجى الرجوع إلى تطبيق Medit Link < الإعدادات للحصول على معلومات تفصيلية حول خيارات الإعدادات.

حالة الشبكة

يمكنك Medit Link من استخدام جميع الميزات بسلاسة عند الاتصال بالشبكة.

لمساعدتك في التحقق من حالة اتصال الشبكة في الوقت الفعلي، يتم عرض أيقونة حالة الشبكة في شريط العنوان.

Network Status

Network speed is good.

Network speed is fast enough.

Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.

Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.

Synchronization is in progress. Some case lists may not match.

Synchronization failed. The case lists may not match.

☐ Work Offline

Close

إذا لم يكن اتصال الشبكة جيدًا، فقد تواجه القيود التالية:

- سيتم تقييد بعض الوظائف، مثل طلب حالة، إنشاء حالة، المشاركة عبر Case Talk وتزامن مع التخزين السحابي.
- يمكن تقليل الأداء العام للخدمة بسبب تأثير الشبكة.

في هذه الحالة، يمكنك الدخول إلى وضع عدم الاتصال لأداء المهام الأساسية ثم استخدام الميزات التي تتطلب الاتصال بالإنترنت بمجرد اتصالك.

ملحوظة


يشير رمز الشبكة إلى سرعة الاستجابة بين المنطقة الحالية و AWS (Amazon Web Service). لا يمثل ذلك سرعة الشبكة لديك، لذلك قد تظهر أحياناً الحالة على أنها رديئة أو سيئة، على الرغم من أن سرعة الشبكة لديك سريعة بدرجة كافية.

إذا كانت العملية الأخرى تستخدم نفس الشبكة، فقد تظهر السرعة على أنها ضعيفة أو سيئة، وقد يكون الأداء العام لـ Medit Link سيئاً. في هذه الحالة، يرجى عدم مشاركة الشبكة مع العمليات الأخرى. على سبيل المثال، تُعدّ ميزة "تحميل البيانات الخام" تشكّل حملاً كبيراً على الشبكة. إذا أظهر الرمز حالة سيئة أو رديئة، فانقل إلى الإعدادات > تحميل البيانات الخام وقم بإيقاف تشغيل "التحميل تلقائياً".

الإعدادات

عام

يوفر خيارات لإعداد النظام بشكل عام.

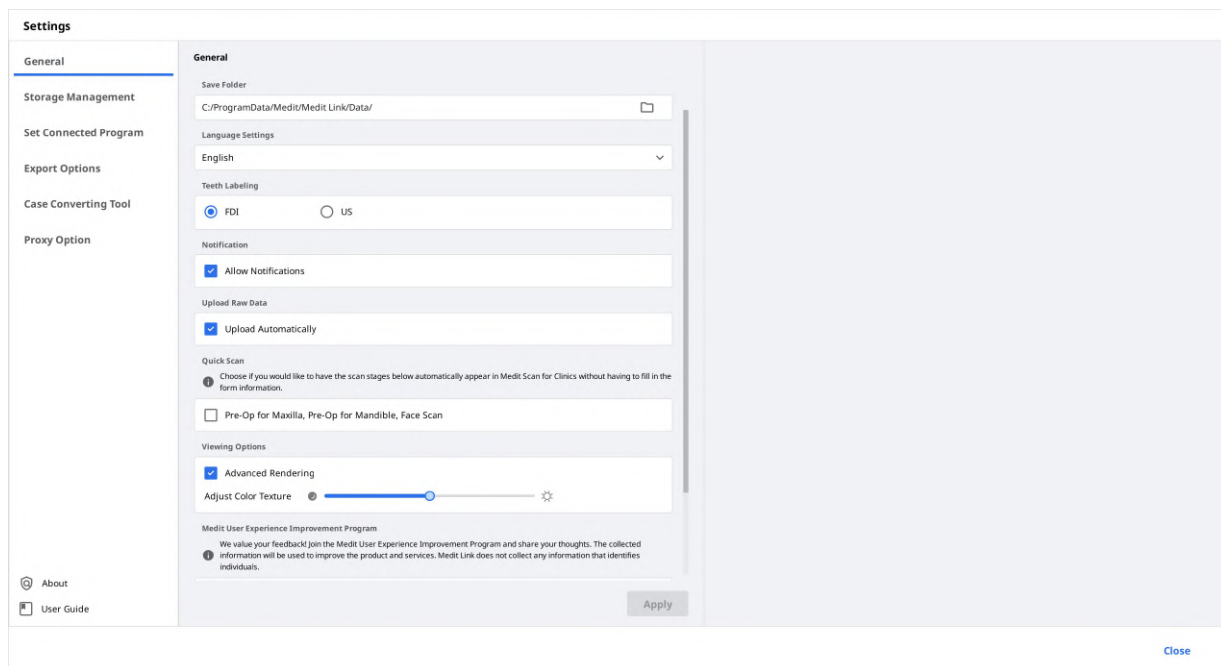


حفظ المجلد	حدد مجلدًا لتخزين نتائج البيانات التي تم إنشاؤها في Medit Link والبرامج المتصلة.
إعدادات اللغة	حدد لغة البرنامج.
ترقيم الأسنان	حدد نظام ترقيم الأسنان بين FDI و US.
إشعارات	عند التحديد، ستتلقى إشعارات بتحديثات البرنامج.
تحميل البيانات الخام	عند التحديد، يتم تحميل البيانات الخام تلقائيًا إلى السحابة. يساعد هذا في خلق نسخة احتياطية من البيانات الأصلية وإجراء مسح سلس عند استخدام Medit Link مع نفس الحساب على جهاز كمبيوتر آخر. تنطبق النسخة الاحتياطية الأصلية للبيانات السحابية فقط على البيانات التي تم الحصول عليها في Medit Scan for Clinics.
مسح سريع	اختر ما إذا كنت تريد أن تظهر مراحل المسح أدناه تلقائيًا في Medit Scan for Clinics دون الحاجة إلى ملء معلومات النموذج. • ما قبل العملية للفك العلوي • ما قبل العملية للفك السفلي • مسح ضوئي للوجه
المعالجة المتقدمة	عند التحديد، يتم عرض النموذج ثلاثي الأبعاد في عرض أكثر حيوية وواقعية.
خيارات العرض	ضبط سطوع النموذج الثلاثي الأبعاد. * قد تختلف الألوان الناتجة قليلاً عن Medit Link عندما تفتح نفس البيانات باستخدام برامج أخرى.
برنامج تحسين تجربة مستخدم Medit	انضم إلى برنامج تحسين تجربة مستخدم Medit. • نستخدم المعلومات التي تم جمعها لتحسين منتجاتنا وخدماتنا. • لا نجمع أي معلومات تحدد هوية الأفراد.

الصفحة الافتراضية بعد تسجيل الدخول	حدد القائمة الافتراضية التي سيتم عرضها عند بدء تشغيل البرنامج. - يمكن لحسابات العيادات الاختيار بين Patient و Case Box - يمكن لحسابات المختبرات الاختيار بين In Box و Work Box
------------------------------------	--

ادارة التخزين

تحقق من مساحة التخزين المحلية ومساحة تخزين السحابة وقم بإدارتها.

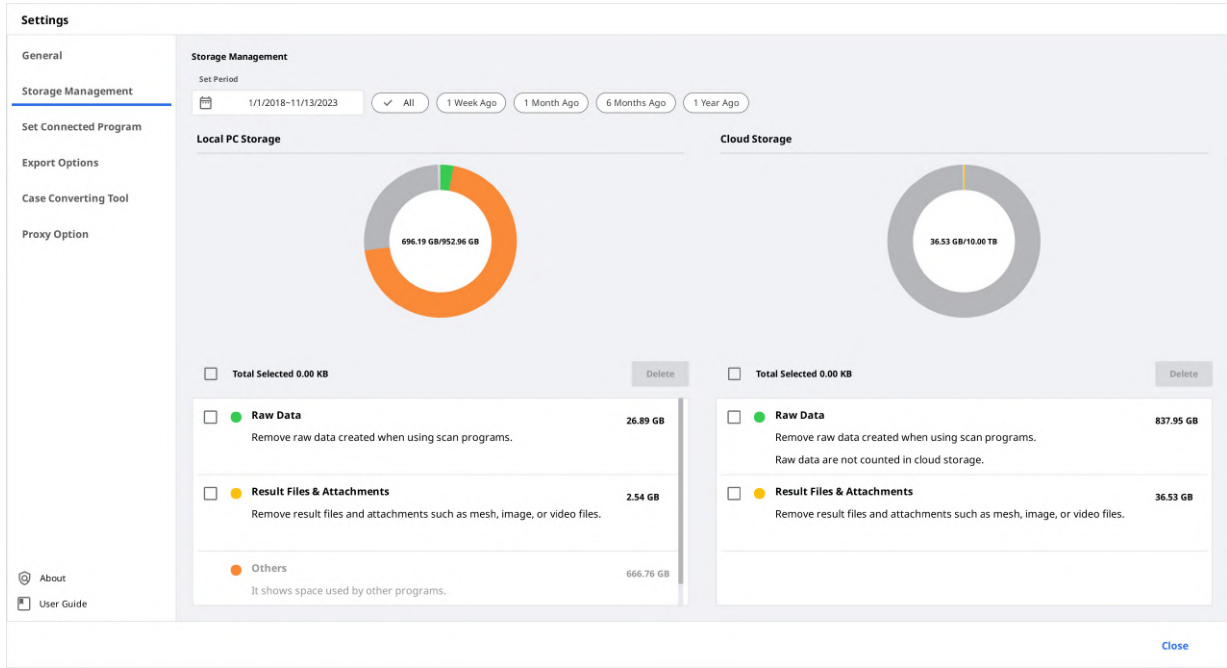

الفترة المحددة

قم بتحديد الفترة لحذف البيانات التي تم إنشاؤها خلال الإطار الزمني أدناه.

- الكل: رؤية كل الملفات.
- منذ أسبوع واحد: رؤية الملفات التي مرّ أسبوع على إنشائها.
- منذ شهر واحد: رؤية الملفات التي مرّ شهر على إنشائها.
- منذ 6 أشهر: رؤية الملفات التي مرّت ستة أشهر على إنشائها.
- منذ عام واحد: رؤية الملفات التي مرّ عام على إنشائها.

التخزين المحلي

قم بإدارة مساحة تخزين جهاز الكمبيوتر.

البيانات الخام	قم بإزالة البيانات الخام المحددة من جهاز الكمبيوتر. إذا تم تحميل البيانات الخام بالفعل إلى السحابة، يمكنك تنزيلها واستخدامها وقتما تشاء.
النتائج & المرفقات	إزالة ملفات النتائج والمرفقات من جهاز الكمبيوتر، مثل الشبكة والصور ومقاطع الفيديو. إذا تم تحميل هذه الملفات بالفعل إلى السحابة، يمكنك تنزيلها واستخدامها وقتما تشاء.
آخرون	عرض الملفات المستخدمة لتشغيل النظام والبرامج الأخرى. يظهر تخزين جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لا يمكنك إزالة هذه الملفات من Medit Link.
حذف	إزالة الملفات المحددة من جهاز الكمبيوتر.


التخزين السحابي

إدارة مساحة التخزين السحابي.

البيانات الخام	لا تشغل البيانات الأولية مساحة في التخزين السحابي، لذلك لن تكون في الدائرة البيانية. ولكن يمكنك إدارة البيانات الأولية من هنا إذا لزم الأمر، على سبيل المثال، حذفها لحماية معلومات المريض الخاصة، إلخ.
النتائج & المرفقات	تشغل ملفات النتائج والمرفقات مساحة في التخزين السحابي. إذا كانت السحابة ممتلئة، يمكنك تأمين المزيد من مساحة التخزين عن طريق إزالة الملفات غير الضرورية.
شراء تخزين	إذا كنت تستخدم خطة Standard، قم بالاشتراك في خطة Premium لتوسيع التخزين السحابي الخاص بك.
حذف	إزالة الملفات المحددة من التخزين السحابي لتحرير مساحة التخزين.

تحديد البرنامج المُتَّصِل

إدارة البرامج التي تدعم الدمج في Medit Link.

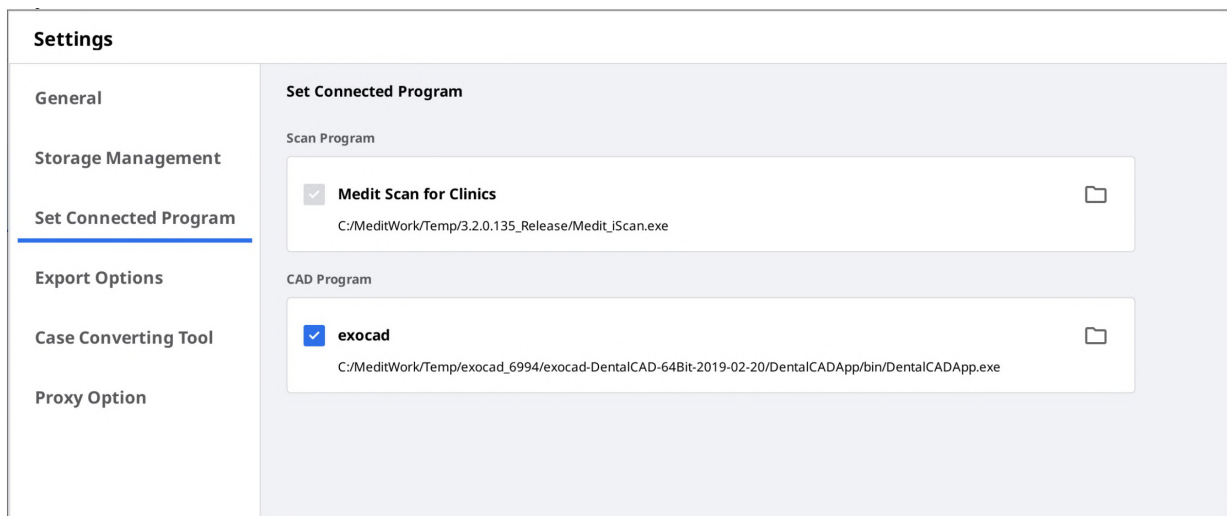

يمكنك توصيل البرامج التالية:

حساب المختبر	حساب العيادة	
Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs	Medit Scan for Clinics	برنامج المسح الضوئي
exocad	exocad	برنامج CAD

ملحوظة

لا يتوفر دمج الخدمات التالية لـ Medit Link على Mac.

- Medit Scan for Labs
- exocad

خيارات التصدير

اضبط كيفية تصدير الملفات من Medit Link.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export Options

Type

exocad

Export Files To

D:\YHGam_Test\

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh
☐ OBJ
☐ PLY
☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☐ JPG
☒ JPEG
☐ PNG
☐ BMP

Compress & Combine

☒ Compress Files
☒ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting
☐ Export a new file and overwrite the existing file. The file currently stored will be lost.
☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

☒ Case Creation Date
☐ Scanned Date
☐ Order Date

☒ Patient Name
☐ Case Name
☐ Partner Name

☐ Patient ID
☐ Order ID

Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

☒ Case Creation Date
☐ Scanned Date
☐ Order Date

☒ Patient Name
☐ Case Name
☐ Partner Name

☐ Patient ID
☐ Order ID

File Name

Case Creation Date - Patient Name

Apply

Close

نوع CAD	حدد برنامج CAD الذي تريد استخدامه للتصميم. سيقوم البرنامج بضبط النتائج بناءً على اختيارك، مما يتيح لك متابعة التصميم دون أي محاذاة إضافية للمحور.
تصدير الملفات إلى	حدد المسار الذي تريد تخزين النتائج فيه.
صيغة الشبكة	حدد تنسيق ملف الشبكة النهائي.
تنسيق الصورة	حدد تنسيق ملفات الصور المصدرة.
الضغط & الجمع	ضغط الملفات: ضغط جميع النتائج في ملف واحد. دمج شبكة فردية: دمج جميع النتائج للفك العلوي أو الفك السفلي في ملف واحد. عند استخدام بعض البرامج التي لا يمكنها استيراد ملفات متعددة والعمل بها، يمكنك دمجها في برنامج واحد للعمل في تلك البرامج.
الخيارات عندما يكون نفس المجلد أو الملف موجودًا بالفعل.	اختر الإجراء الافتراضي لحالات وجود نفس اسم المجلد أو الملف في المسار الهدف. - اسأل دائمًا عند التصدير. - تصدير ملف جديد والكتابة فوق الملفات الموجودة. سيتم فقد الملف المخزن حاليًا. - إنشاء مجلد وتصدير الملفات
قواعد اسم المجلد	حدد قواعد إنشاء اسم مجلد عند تصدير الملفات. سيتم تطبيق القواعد المحددة على تسمية المجلد، وسيتم حفظ الملف الذي تم تصديره في المجلد الذي تم إنشاؤه. يمكن استخدام المعلومات أدناه لتعيين القاعدة. - حساب العيادة - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف المريض، رقم تعريف الطلب - حساب المختبر - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف الطلب

61

تحديد القواعد لاسم الملف الذي تم تصديره. يمكن استخدام المعلومات أدناه لتعيين القاعدة. - حساب العيادة - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف المريض، رقم تعريف الطلب - حساب المختبر - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف الطلب	قواعد اسم الملف
--	-----------------

أداة تحويل الحالة

يمكنك نقل الحالات بين الحسابات المختلفة عن طريق تصدير الحالات الموجودة بالحساب أو استيراد الحالات المصدرة من حسابات أخرى.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Export

1/1/2018-11/13/2023 All All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name

CaseBox_2023-11-13_15250

Export Files To

C:/Users/김영민/Desktop/

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_caries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

Close

تصدير الحالة

تصدير حالات الحساب الذي تم تسجيل الدخول إليه حاليًا إلى جهاز الكمبيوتر المحلي.

1. افتح Medit Link وانقر على أيقونة الإعدادات.

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education

Patient

+ New Patient + New Case

View Options

Total Patients: 3500 All All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

2. اختر "أداة تحويل الحالة" في القائمة على الجانب الأيسر.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Export

1/1/2018~11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name
CaseBox_2023-11-13_152111

Export Files To
C:/Users/김영민/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From
C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_caries.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

About
User Guide

Close

3. في قسم التصدير، قم بتعيين فترة أو ابحث عن حالات لتصديرها إذا لزم الأمر.

Export

1/1/2018~11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name
☐ TEST111의 케이스
☐ TEST111's Case
☐ Medit Ortho Simulation

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name

☒ Contains
☐ Equals

4. اختر الحالات التي تريد تصديرها من القائمة الموجودة في قسم "الملفات المراد تصديرها".

Export

1/1/2018~11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☒ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM

5. قم بتعيين اسم الملف عن طريق تعديل اسم الحالة في حقل اسم الملف.

6. قم بتعيين المجلد الوجهة لتصدير الحالات المختارة.

7. انقر على "تصدير".

8. انقر على "نعم" لفتح المجلد الذي تم تصدير الملف إليه.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. يتم حفظ الحالات المصدرة بتنسيق ملف .meditex.

إستيراد حالة

1. افتح Medit Link وانقر على أيقونة الإعدادات.

MEDIT Link 3.2.0 Medit Education

Patient

Total Patients: 3500

All / Contains

#	Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
	#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
	#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
	#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

2. اختر "أداة تحويل الحالة" في القائمة على الجانب الأيسر.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

About

User Guide

Export

1/1/2018-11/13/2023 All / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ Medit Margin Line Sample (UG)	User Guide	11/13/2023 9:53 AM
☐ Daichi-Before's Case	Daichi-Before	11/10/2023 5:05 PM
☐ medit's Case - Clone	medit	11/10/2023 4:54 PM
☐ medit's Case	medit	11/10/2023 4:53 PM
☐ Daichi-Beta's Case	Daichi-Beta	11/10/2023 4:47 PM
☐ TEST111의 케이스	TEST111	11/10/2023 4:28 PM
☐ TEST111's Case	TEST111	11/10/2023 4:24 PM
☐ Medit Ortho Simulation	Sample	11/10/2023 4:18 PM
☐ Medit's Case	Medit	11/10/2023 4:07 PM

File Name

CaseBox_2023-11-13_152111

Export Files To

C:/Users/김영민/Desktop/

Export

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-7-5_171632_cases.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
-----------	-------------

3. في قسم الاستيراد، انقر على رمز المجلد لتصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحثًا عن ملف meditex الذي تريد استيراده.

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

4. انقر على الزر "استيراد" وتحقق من الملفات المراد استيرادها في القائمة أدناه.

Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

Import From

C:/ReleaseBuild/CaseBox_2023-11-13_152111.meditex

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2023-10-23_161849.meditex	11/13/2023 4:08 PM
CaseBox_2023-11-13_152111.meditex	11/13/2023 4:08 PM

5. ستظهر الحالة المستوردة أيضًا في Case Box (حساب العيادة) أو Work Box (حساب المختبر).

خيارات الوكيل

في الأماكن ذات الشبكة المحدودة، يمكنك تغيير إعدادات الشبكة.

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'Proxy Option' tab selected. The 'Proxy Server' toggle is turned on. Below it, there are input fields for 'Proxy Server IP (or DNS)', 'Proxy Server Port' (set to 0), and 'Proxy Server Scheme' (set to HTTPS). There are also optional fields for 'Proxy Server Username' and 'Proxy Server Password'. At the bottom right of the settings area is an 'Apply' button. In the bottom right corner of the window is a 'Close' button. The left sidebar contains links to 'About' and 'User Guide'.

حول

إظهار معلومات مفصلة حول Medit Link.




دليل المستخدم

احصل على دليل المستخدم لـ Medit Link.

يتطلب فتح دليل المستخدم اتصالاً بالإنترنت.

Dashborad

يمكنك عرض الإحصائيات الخاصة بالعمل بأكمله على Medit Link في رسوم بيانية وجدول - في كل من تطبيق وموقع .Medit Link

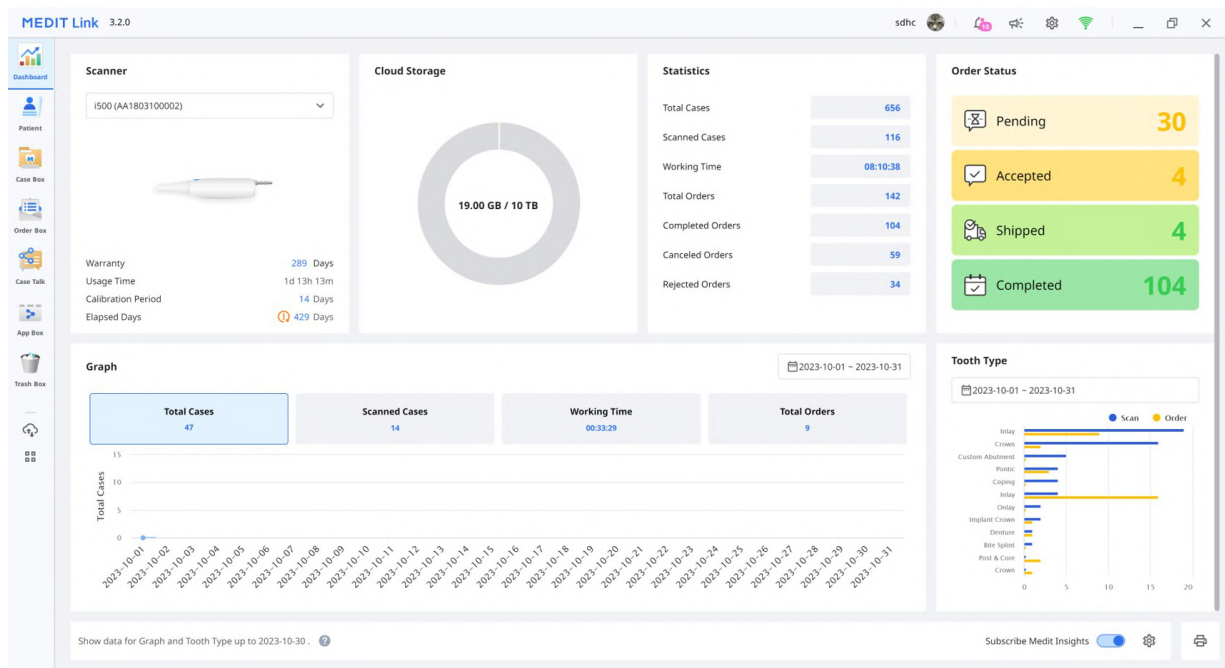

ملحوظة

يرجى الرجوع إلى موقع Medit Link > Dashboard لمزيد من المعلومات حول Dashboard و .Medit Insights

Patient

يمكنك إضافة المرضى، تعديلهم، حذفهم أو دمجهم في قائمة Patient.

MEDIT Link 3.2.0 | Wanhoo Choi_clinic

Patient | + New Patient | + New Case

View Options

Total Patients: 106 | All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	
K k						
KELLY				1	2021-07-02	Scan
M m						
Medit Sample				4	2023-11-05	Scan
MeditLink 3.0's				1	2023-01-17	Scan
Multi Occlusion Normal Case				1	2023-02-09	Scan
Michele Rinn				3	2021-04-26	Scan
N n						
newpatient				1	2022-10-13	Scan
O o						
ORG_[Clinics][2.6.2] 03 Clinical				1	2023-06-14	Scan
Order Test - Change Name				2	2023-07-24	Scan
R r						

إضافة مريض جديد

1. انقر على "مريض جديد".

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

[Cancel](#) [Save](#)

2. املأ المعلومات المطلوبة في مربع حوار "المريض الجديد"، ثم انقر على "حفظ".

حذف مریض

ملحوظة 🔍

يمكنك حذف مريض فقط في حالة عدم وجود حالات للمريض.

1. حدد المريض الذي تريد حذفه من القائمة.

MEDIT Link 3.2.0

Dr. Celeb [Profile Icon] [Notification Icon] [Settings Icon] [Signal Icon] [Language Icon]

[Dashboard Icon] Patient [New Patient Button] [New Case Button]

View Options [More Icon]

Edit Delete Merge Patients Selected Patients: 2 All / Contains [Search Icon]


	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registration Date	Recent Visit Date
T t							
Order Box	☐ Tomita, Cheri				1	2023-09-18	2023-09-18
Care Box	☒ Temporaries				0	2023-10-04	
Care Talk	☒ T.Q.P	외환부	M	1987-11-04	0	2023-09-07	

2. انقر على "حذف".


دمج مرضی

يمكنك دمج جميع حالات المرضى المتعددين في مريض واحد.

1. حدد المرضى الذين تريد دمجهم من القائمة.

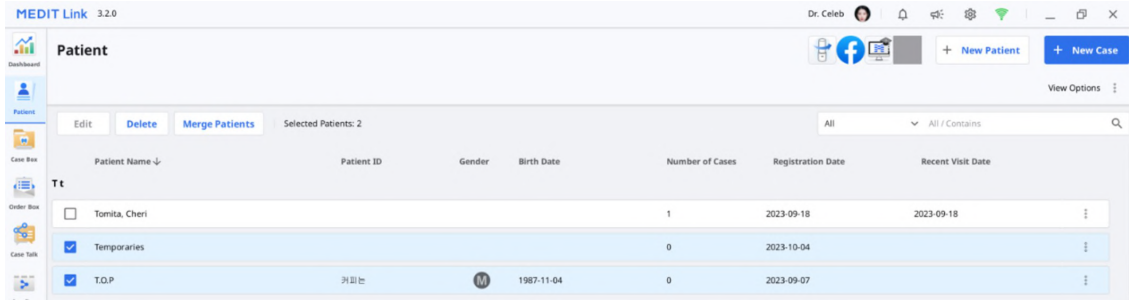


2. انقر على "دمج المرضى".
3. حدد المريض الهدف الذي ترغب في دمج جميع الحالات فيه.
4. يتم دمج جميع الحالات في المريض الهدف ويتم الاحتفاظ بمعلوماته الخاصة.

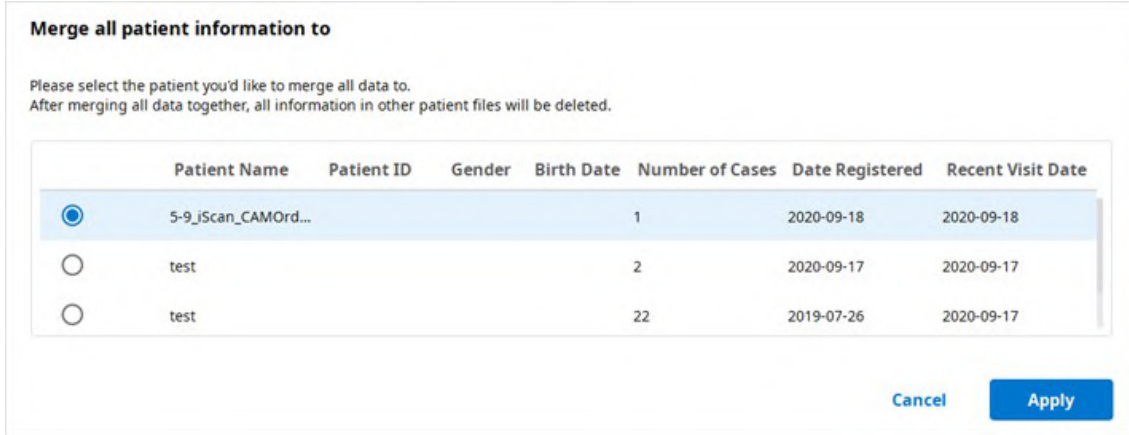

5. انقر على "تطبيق" لمباشرة الدمج.

Case Box/Work Box

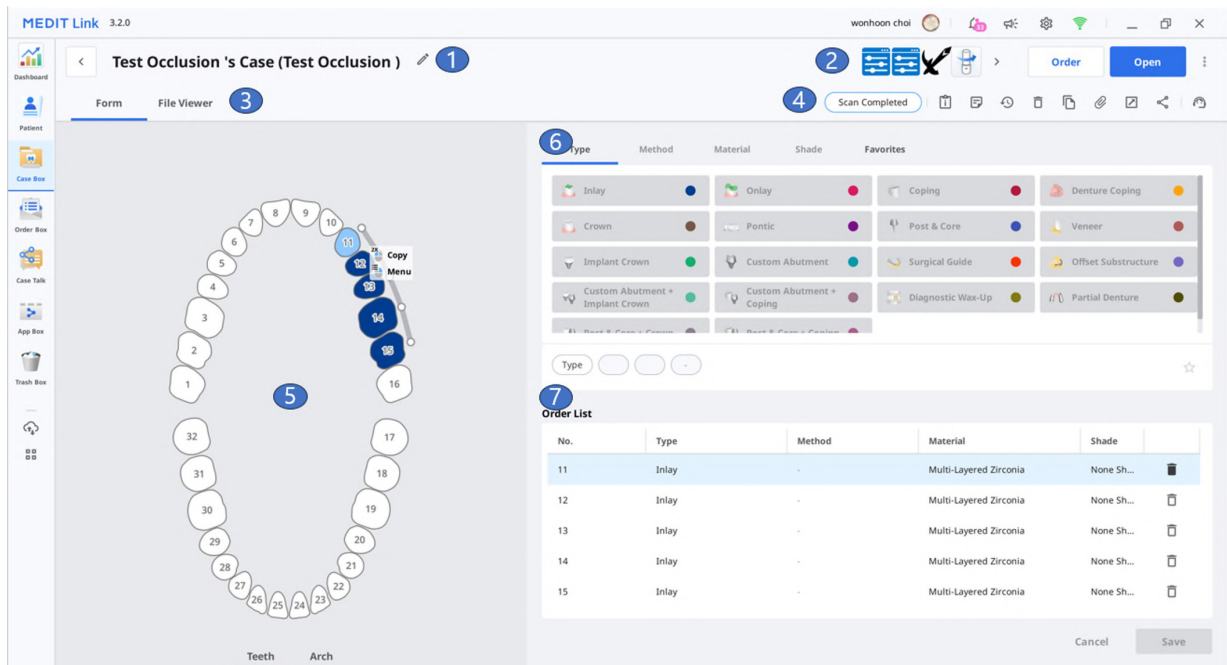

1	إظهار اسم الحالة واسم المريض.
2	توفير الميزات الرئيسية المتاحة: الطلب/المسح (مفتوح) /أضرار الطلب وأيقونات التطبيقات.
3	إظهار علامات التبويب المتاحة: النموذج، CAD، وعارض الملفات.
4	عرض وظائف لإدارة الحالات والملفات.
5	إظهار واجهة مستخدم تسجيل النموذج لبرنامج CAD المحدد.
6	توفير معلومات النوع/الطريقة / المادة/اللون للمستخدمين للاختيار لرقم السن المحدد.

علامات التبويب في Case Box/Work Box

النموذج	CAD	عارض الملفات
توفر علامة تبويب النموذج واجهة مستخدم لإدخال المعلومات الأساسية للمسح الضوئي، مثل النوع والطريقة والمواد الخاصة بأرقام الأسنان وخيارات المسح. يتم تمرير المعلومات التي تدخلها إلى برنامج المسح الضوئي المتصل واستخدامها كمعلومات طلب عند تقديم طلب مع شريكك.	توفر علامة التبويب CAD واجهة مستخدم لتعيين خيارات CAD. يتم تمرير المعلومات التي تقوم بإعدادها إلى برنامج CAD المتصل.	عرض ملفات النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة برامج المسح و CAD. يعرض عارض الملفات ويدير النماذج ثلاثية الأبعاد والصور ثنائية الأبعاد التي تم الحصول عليها أو المرفقة.


الوظائف في Case Box/Work Box

يتم توفير الوظائف التالية في Case Box/ Work Box.

حالة الحالة	إظهار حالة الحالة.								
	توفير اختصارًا للحالة نفسها في box آخر (Case Box ↔ Order) (In Box ↔ Work Box).								
	راجع تفاصيل الحالة واحفظها كملف PDF أو اطبعها.								
	أضف مذكرة أو علامات عند التسجيل أو طلب حالة. استخدمها لتوصيل أي معلومات إضافية أو تكميلية عن الحالة لشركائك.								
	يوفر معلومات مفصلة حول تاريخ الحالة.								
	History <table> <tr> <td>Last Modified Date</td> <td>3/29/2022 1:57 PM</td> </tr> <tr> <td>Scanning Date</td> <td>4/12/2021 2:06 PM</td> </tr> <tr> <td>Creation Date</td> <td>3/22/2022 1:17 PM</td> </tr> <tr> <td>Case Size</td> <td>435MB</td> </tr> </table> Close	Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM	Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM	Creation Date	3/22/2022 1:17 PM	Case Size	435MB
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM								
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM								
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM								
Case Size	435MB								
	حذف الحالة.								
	لا يمكنك حذف الحالات المطلوبة أو الحالات التي تم إنشاؤها في وضع عدم الاتصال.								
	إنشاء نسخة من الحالة الحالية في Case Box. يتم نسخ جميع البيانات إلى الحالة المستنسخة. تساعد هذه الميزة على تكرار معلومات العلاج لنفس المريض أو تقديم طلب إضافي بنفس المعلومات أو الملفات.								
	إرفاق ملفات بتنسيقات مختلفة.								
	تصدير ملفات المسح الضوئي أو نتائج CAD إلى جهاز الكمبيوتر المحلي. يمكنك اختيار تنسيق الملف المفضل لديك عند تصدير الملفات. يمكن استخدام الملفات المصدرة في برامج CAD و CAM لمزيد من العمل.								

إنشاء رابط للمشاركة.		
يمكن للمستخدمين الذين لديهم الرابط المشارك الوصول إلى البيانات ثلاثية الأبعاد في متصفح مثل Chrome أو Firefox أو Safari دون تثبيت برامج إضافية. يمكنك مشاركة الرابط بحرية مع أي شخص أو أشخاص محددين فقط. يمكن تعيين رقم سري أو تاريخ انتهاء صلاحية الرابط لتأمين المعلومات الخاصة.	مشاركة	
انتقل إلى صفحة مركز مساعدة Medit لتقديم طلب الدعم.	إرسال طلب الدعم	

Order Box/In Box

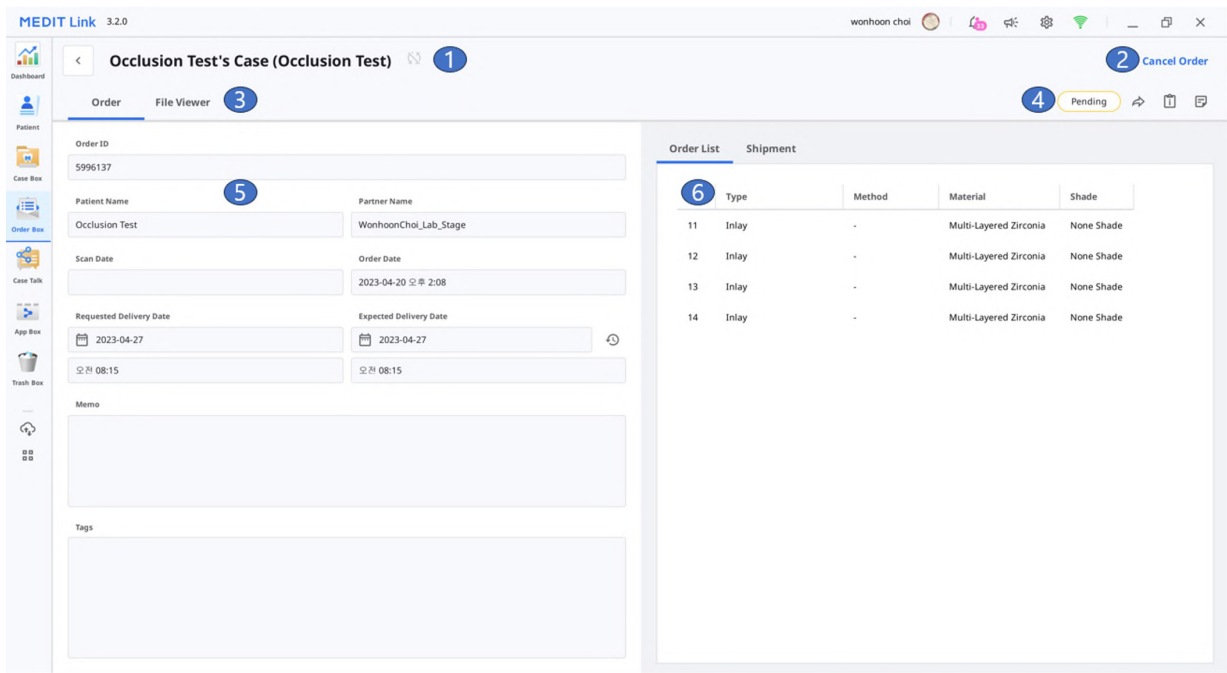

1	عرض اسم الحالة واسم المريض.
2	توفير وظائف لإدارة الطلبات (القبول/الإلغاء ؛ التسليم/الاستلام).
3	إظهار علامات التبويب المتاحة: الطلب، عارض الملفات
4	عرض وظائف لإدارة الحالات والملفات: حالة الحالة، الاختصارات للحصول على معلومات مفصلة، معلومات الحالة، المذكرة & العلامات، إلخ.
5	عرض المعلومات المفصلة للطلب بما في ذلك رقم الطلب، اسم المريض، اسم الشريك، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة & العلامات.
6	عرض معلومات المنتج المطلوب وحالة التسليم.

علامات التبويب في Order Box/In Box

الطلب	عارض الملفات
تحقق من المعلومات التفصيلية المتعلقة بالطلب، مثل رقم الطلب، اسم المريض، اسم الحساب، تاريخ المسح، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة والعلامات.	تحقق من الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة عمليات المسح/CAD. يعرض عارض الملفات ويدير النماذج ثلاثية الأبعاد والصور ثنائية الأبعاد التي تم الحصول عليها أو المرفقة.

Case Talk

يمكن مشاركة الحالات التي تم إنشاؤها في Medit Link مع أشخاص محددين، أو أي شخص لديه الرابط المشترك أو الأعضاء المسجلين في Medit Link.

يمكن للمستخدم رؤية قائمة بجميع الحالات المشتركة من خلال Case Talk في تطبيق Medit Link وموقع Medit Link.

ملحوظة

تتطلب خدمة Case Talk اتصالاً بالإنترنت.

MEDIT Link 3.2.0

Case Talk

2018-01-01 ~ 2023-11-01 Case Talk Name Case Talk Name / Contains

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date
BS_4_Scan for Clinics's Case - Clone_2023-10-31 15:04:08	BS***** fo* C*****	Maxilla, Mandible	2020-09-25 14:12	2023-10-31 15:04	2024-01-29 23:59
BS_4_Scan for Clinics's Case - Clone_2023-10-20 11:59:15	BS_4_Scan for Clinics	Maxilla, Mandible	2020-09-25 14:12	2023-10-20 11:59	2023-11-20 23:59
1111	Email_Push	24, 25	2022-09-30 13:48	2022-09-30 16:35	unlimited

يمكن عرض الحالات المشتركة عبر مستعرض ويب دون تثبيت برنامج منفصل، مما يتيح سهولة الاتصال عبر البيانات ثلاثية الأبعاد على أجهزة مختلفة.

App Box

يوفر App Box العديد من البرامج الإضافية التي تكمل سير عمل المسح الضوئي الأساسي وتعزز الإنتاجية.

تتكون App Box من "Medit Apps"، والتي تتضمن التطبيقات الأصلية التي طورتها Medit، و"Partner Apps"، وهي تطبيقات تكامل مع شركاء Medit من قطاعات مختلفة من طب الأسنان الرقمي، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، وبرامج CAD/CAM، وما إلى ذلك.

قم بتنزيل التطبيقات المتاحة من Medit Apps و Partners App لإنشاء تعويضات سنوية، تحليل بيانات المسح، مساعدتك أثناء الاستشارة، أو تبسيط عملية عملك.

MEDIT Link 3.2.0

App Box

Search by App Information

All Medit Apps Partner Apps

All Apps All Categories

Medit ClinicCAD CAD By MEDIT v 0.9.2.237 2023-10-23 Total Downloads 226 Install	Medit Caries Detection Tool By MEDIT v 0.9.0.47 2023-08-07 Total Downloads 40 Install	Medit Occlusion Analyzer Analysis Tool By MEDIT v 1.0.1.72 2023-03-28 Total Downloads 84 Installed
Medit Margin Lines Tool CAD By MEDIT v 1.0.0.23 2022-12-08 Total Downloads 43 Installed	MIPACS Integration PACS/PMS By MIPACS v 0.9.0.0 2023-10-05 Total Downloads 7 Install	Medit Splints Tool By Medit R&D v 1.1.0.9 2023-08-10 Total Downloads 181 Update
Medit Design (Formerly Known as Medit Compare) Tool By Medit R&D v 2.1.3.95 2023-05-08 Total Downloads 43 Installed	Medit Model Builder Tool CAD By MEDIT v 1.3.2.65 2023-05-04 Total Downloads 7 Install	Medit Ortho Simulation Tool By Medit R&D v 1.3.0.22 2022-12-08 Total Downloads 181 Update

MEDIT SHOP Time to Get Extended Warranty for Your Scanner SHOP ALL

MEDIT Shop

The Medit Times Explore the real-life practices of Medit users

MEDIT Learn more

Trash Box

يخزن Trash Box مؤقتًا الحالات المحذوفة. يمكن استعادة أي حالة في Trash Box أو حذفها نهائيًا.

⚠ يرجى الحذر

سيتم حذف البيانات المحذوفة في Trash Box نهائيًا من جهاز الكمبيوتر والخادم ولا يمكن استعادتها.

MEDIT Link
3.2.0
wonhoon Choi

Dashboard
Patient
Case Box
Order Box
Case Talk
App Box
Trash Box

Trash Box

☐ Restore
☐ Selected Cases: 0

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐	Scan Completed Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon Choi	66,654 KB
☐	Form Only G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon Choi	0 KB
☐	Form Only G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon Choi	0 KB
☐	Form Only G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon Choi	0 KB
☐	Form Only G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon Choi	0 KB
☐	Form Only G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon Choi	0 KB
☐	Form Only G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon Choi	0 KB
☒	Case Completed Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon Choi	23,652 KB
☐	CAD Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon Choi	23,652 KB
☐	Form Only Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon Choi	0 KB
☐	Form Only Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon Choi	0 KB
☐	Form Only Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon Choi	0 KB
☐	Form Only Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon Choi	0 KB

مدير مزامنة الحالات

يساعدك مدير مزامنة الحالات على تحميل وتزيل الحالات في Medit Link. يمكنك تحميل عدة حالات على السحابة أو تنزيلها على جهاز الكمبيوتر المحلي الخاص بك.

Case Synchronization Manager

Upload

Download

Total Count: 240

Cancel All

Download All

Case Name	Date Modified ↓	Size	Status	
☐ test's Case	2021-09-07	318.58 MB	Need Download	
☐ test scan	2021-09-02	626.09 MB	Need Download	
☐ test's Case	2021-09-02	6.61 kB	Need Download	
☐ test's Case	2021-08-26	127.31 kB	Need Download	
☐ test's Case	2021-08-24	172.75 MB	Need Download	
☐ test's Case	2021-08-23	516.34 kB	Need Download	
☐ test's Case	2021-08-19	74.13 MB	Need Download	
☐ test's Case11111111111111111111111111231231231312333111111111111111144444444	2021-08-19	133.15 MB	Need Download	
☐ 2.3.6 Case - Clone - Clone - Clone - 복제 - 복제 - Clone	2021-08-19	234.72 MB	Need Download	
☐ test's Case	2021-08-19	496.65 kB	Need Download	
☐ test's Case	2021-08-13	248.79 kB	Need Download	
☐ test's Case	2021-08-13	149.20 MB	Need Download	

Close

التحميل

إجمالي الحالات/الحالات المحددة	تحقق من عدد جميع الحالات أو المحددة، التي يجب تحميلها.
تحميل الكل	تحميل كل الحالات على السحابة.
إلغاء الكل	إلغاء جميع طلبات التحميل.
	تحميل الحالة على السحابة.
	إلغاء تحميل الحالة.
	محاولة تحميل الحالة مجدداً.

التنزيل


إجمالي الحالات/الحالات المختارة	تحقق من عدد جميع الحالات أو المحددة، التي يجب تنزيلها.
تنزيل الكل	تنزيل جميع الحالات على جهاز الكمبيوتر.
إلغاء الكل	إلغاء جميع طلبات التنزيل.
	تنزيل الحالة على جهاز الكمبيوتر.
	إلغاء تنزيل الحالة.
	أعد محاولة تنزيل الحالة.

معلومات عن Medit

يمكنك الانتقال مباشرة إلى القوائم المتوفرة فقط على موقع Medit Link، مثل My Info، Partners وMembership. يرجى الرجوع إلى Medit Link > Partners، Medit Link، وMembership، My Info للحصول على أوصاف تفصيلية لقوائم موقع Medit Link.

يمكنك الوصول إلى متجر Medit عبر الإنترنت، Medit Shop، حيث يمكنك شراء ضمانات ممتدة للماسحات الضوئية وبيع Medit الأخرى، مثل حقائب الظهر للماسحات الضوئية.

يمكنك أيضاً الحصول على معلومات متنوعة حول استخدام Medit Link. يمكنك الوصول إلى موارد Medit التعليمية والإعلامية، مثل مركز مساعدة Medit وقناة Medit Academy على YouTube ومنصة Medit Academy للتعليم عبر الإنترنت.

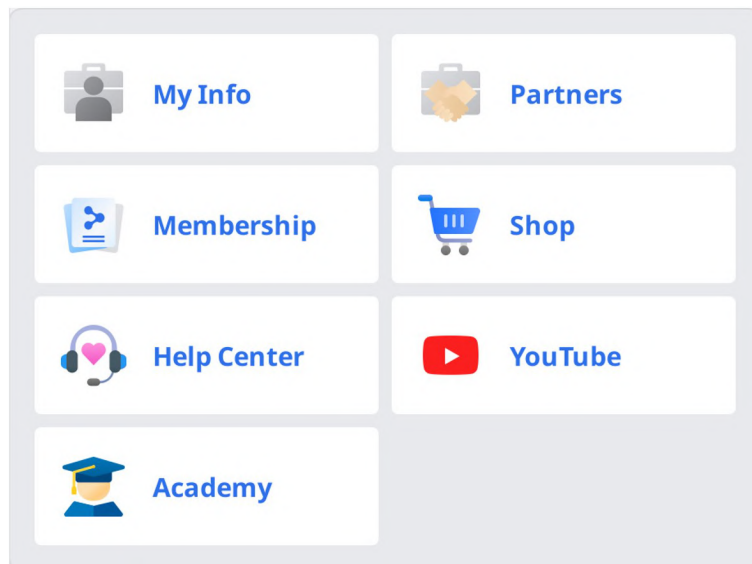

عارض الملفات

يقوم عارض الملفات بتجميع وعرض البيانات المختلفة، بما في ذلك البيانات المكتسبة من البرامج المرتبطة بـ Medit Link والبيانات المرفقة من قبل المستخدمين.

يوفر وظائف الإدارة الأساسية مثل إظهار/إخفاء البيانات وضبط العتامة وحذف البيانات.

يدعم معاينات الملفات بالتنسيقات التالية:

- البيانات ثلاثية الأبعاد: STL، OBJ، PLY
- الصور ثنائية الأبعاد: PNG، JPG، JPEG، BMP، GIF، TIF، TIFF
- ملفات الفيديو: MKV، MP4، AVI، WMV

شجرة البيانات

يمكنك جمع وعرض كافة البيانات الخاصة بالحالة في شجرة البيانات. يمكنك أيضًا إظهار/إخفاء البيانات وضبط الشفافية وحذف البيانات من شجرة البيانات.

إظهار/إخفاء	يمكنك إظهار أو إخفاء البيانات.	
العتامة	يظهر شريط التمرير عند النقر على إحدى البيانات الموجودة في شجرة البيانات. يمكنك ضبط عتامة البيانات المعروضة عن طريق تحريك شريط التمرير.	
المزيد	يؤدي النقر على رمز المزيد إلى إظهار الميزات الإضافية المتاحة.	
	Maxilla Base • إظهار هذا فقط: إخفاء جميع البيانات الأخرى ولكن عرض البيانات المقابلة فقط. • إخفاء: إخفاء البيانات. • نسخ: نسخ البيانات وإضافتها إلى مجموعة المرفقات. • تصدير: تصدير الملفات المحددة. • إعادة التسمية: تغيير اسم البيانات. • حذف: حذف البيانات.	

ملحوظة

يمكنك إعادة تسمية البيانات عند الاتصال بالإنترنت.

أدوات التحكم في النموذج

التحكم في النموذج ثلاثي الأبعاد

تحريك كامل	تحريك النموذج.	
------------	----------------	--

تدوير النموذج.	تدوير	
تكبير وتصغير النموذج.	التكبير/التصغير	
وضع النموذج في وسط الشاشة.	التكبير مع الملاءمة	
إظهار البيانات بألوان نسيج حقيقية.	النسيج مفعّل	وضع عرض النموذج 
إظهار البيانات بلون واحد.	النسيج غير مفعّل	
عرض الشبكة في الخلفية.	الشبكة مفعّلة	إعدادات الشبكة (mm)   
تراكب الشبكة فوق النموذج.	تراكب مفعّل	
إخفاء الشبكة.	الشبكة غير مفعّلة	

التحكم بالصور ثنائية الأبعاد


التنقل بين الصور.	الصورة التالية/السابقة	
تعديل الصورة.	تعديل	
يمكنك فصل نافذة الصورة وضبطها على الموضع المطلوب. يمكنك تغيير حجم النافذة. عند إعادة النافذة إلى موقعها الأصلي، تعود إلى حجمها الافتراضي.	قرص/لصق النافذة	 

أدوات وظيفية

التقاط الصور والمذكرة


التقط الشاشة الحالية كصورة ثنائية الأبعاد أو ارسم عليها أو أضف ملاحظات.

يمكنك حفظها كملف مع ملاحظاتك وإرسالها كمرجع.

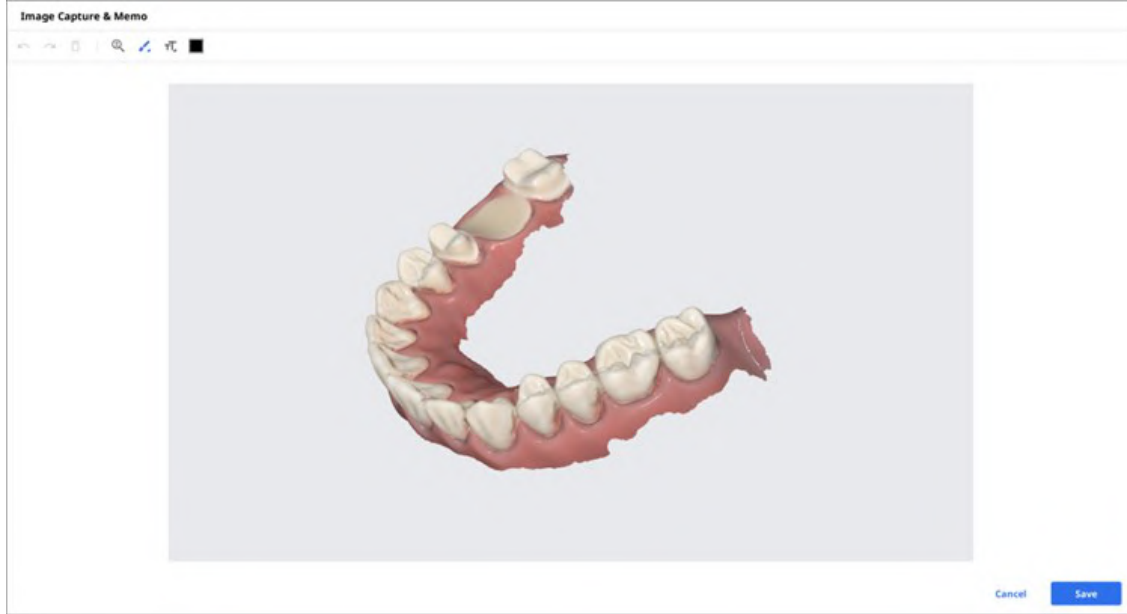

Ortho Capture

التقط الصور في اتجاه العرض الحالي وأعلى/ أدنى/يسار/يمين من اتجاه العرض الحالي.

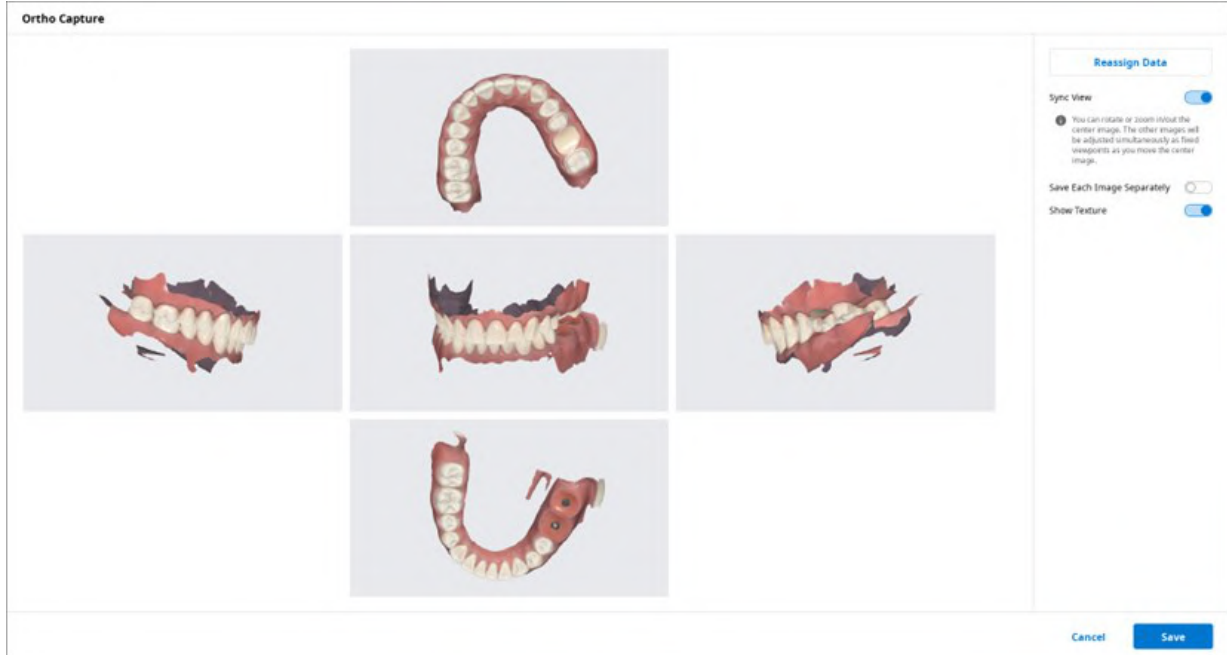

عند التشغيل، يمكنك تدوير أو تكبير/تصغير الصورة المركزية. سيتم ضبط الصور الأخرى في نفس الوقت كنقاط رؤية ثابتة أثناء تحريك الصورة المركزية.

عند إيقاف التشغيل، يمكنك تحريك جميع الصور أو تدويرها أو تكبيرها/تصغيرها بشكل فردي.

عرض المزامنة

حفظ كل صورة بدقة عالية. قم بتفعيل/إيقاف تفعيل نسيج النموذج. قم بتغيير بيانات الفك العلوي/الفك السفلي باستخدام ميزة إعادة تعيين البيانات. يمكنك استخدام البيانات المغيرة لإنشاء واستخدام الصور الناتجة من Ortho Capture.	حفظ كل صورة بشكل منفصل إظهار النسيج
إعادة تعيين المعلومات	مسح البيانات: يتم عرض بيانات المسح الضوئي للحالة. الفك العلوي: يتم عرض البيانات التي حددتها للفك العلوي. الفك السفلي: يتم عرض البيانات التي حددتها للفك السفلي.


ملء الثقوب

ملء الثقوب في بيانات الشبكة ثلاثية الأبعاد.



القص


يوفر القص أدوات متنوعة لتعديل البيانات.

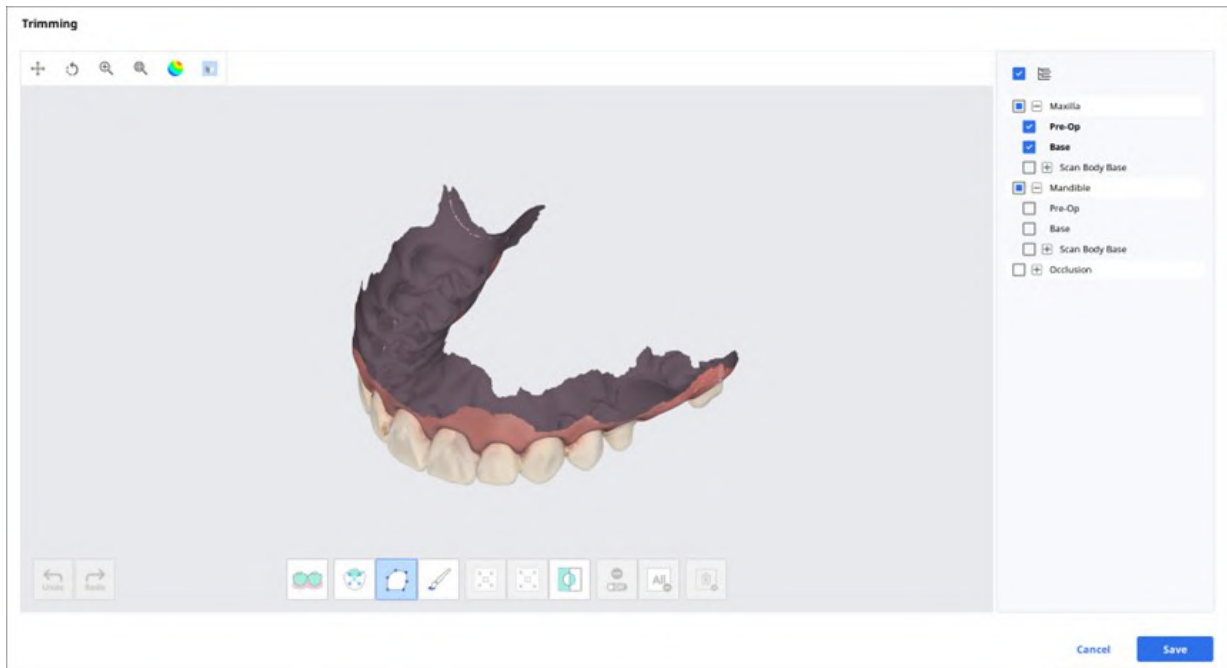

يمكن تعديل بيانات الشبكة ثلاثية الأبعاد المحددة باستخدام أدوات مختلفة موجودة في الجزء السفلي من النافذة.

الاختيار	التحديد الذاتي للأسنان		لتحديد كل أسنان الفك تلقائيًا، تاركًا أجزاء اللثة. ملحوظة هذه الوظيفة متاحة فقط لبيانات المسح التي تم الحصول عليها باستخدام Medit Scan for Clinics مع تشغيل خيار "إستخدام المعالجة بـ كارت الشاشة".
	التحديد الذاتي للسن الواحد		تحديد مساحة السن الواحد تلقائيًا بنقرة واحدة. يمكنك النقر أو السحب على السن.
	التحديد متعدد الخطوط		حدد جميع الكيانات داخل شكل متعدد الخطوط مرسوم على الشاشة.
	تحديد بالفرشاة		حدد جميع الكيانات على مسار مرسوم يدويًا على الشاشة. سيتم تحديد الوجه الأمامي فقط. تأتي الفرشاة بثلاثة أحجام مختلفة.
تعديل المنطقة المختارة	تقليص المنطقة المحددة		قم بتقليل المنطقة المحددة في كل مرة تضغط فيها على الزر.
	توسيع المنطقة المحددة		قم بتوسيع المنطقة المحددة في كل مرة تضغط فيها على الزر.
	عكس المنطقة المحددة		عكس التحديد.
إلغاء التحديد	التحديد/إلغاء التحديد		عند التشغيل، قم بإلغاء تحديد المنطقة باستخدام أدوات مختلفة.
	إلغاء كل ما تم تحديده		إلغاء كافة المناطق المحددة.
	حذف المنطقة المحددة		حذف البيانات من المنطقة المحددة.


1. حدد المنطقة التي تريد قصها باستخدام أدوات تحديد المنطقة.

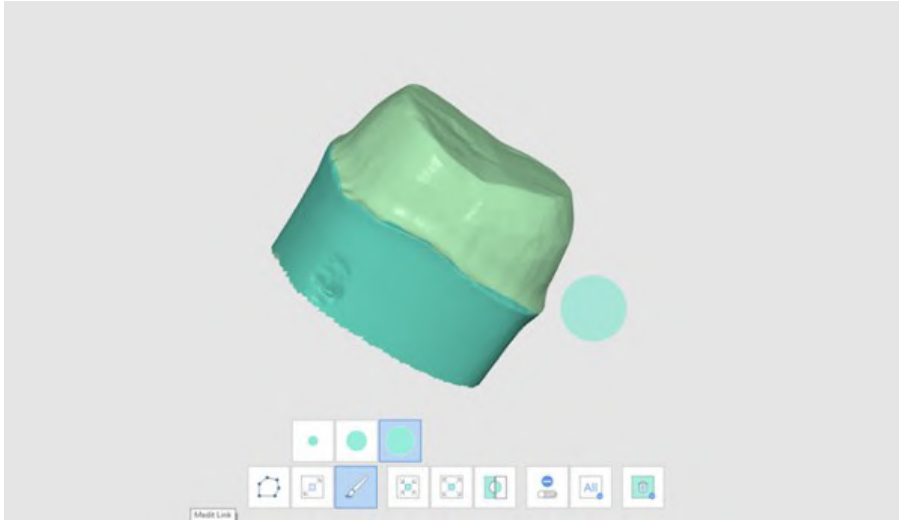


ملحوظة

تحدد أداة القص المتعدد الخطوط جميع الكيانات داخل شكل متعدد الخطوط مرسوم على الشاشة، بينما
تحدد أداة القص بالفرشاة بيانات الوجه الأمامي فقط.


2. يمكنك عكس التحديد أو تقليصه أو توسيعه باستخدام الأدوات الثلاثة التالية.
 - عكس المنطقة المحددة

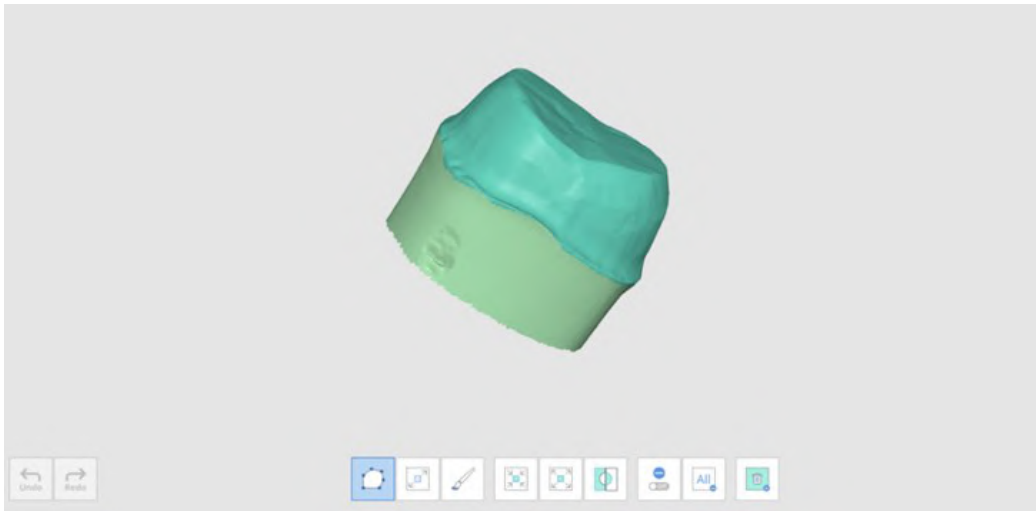

- تقليص المنطقة المحددة

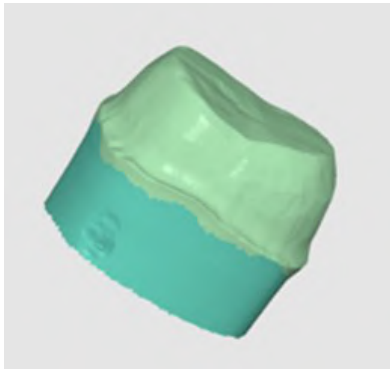


- توسيع المنطقة المحددة

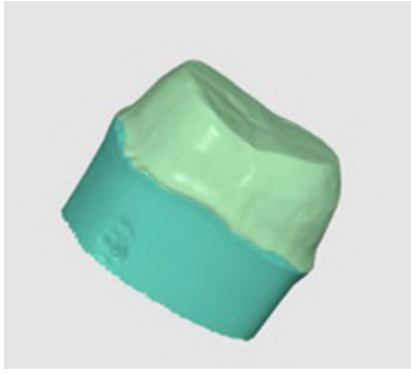


3. يمكنك إلغاء تحديد المناطق المحددة باستخدام أداة حذف المنطقة المحددة.


تحسين محاذاة الإطباق

تحسين محاذاة الإطباق. يمكنك اختيار البيانات الهدف وضبط محاذاة الإطباق.

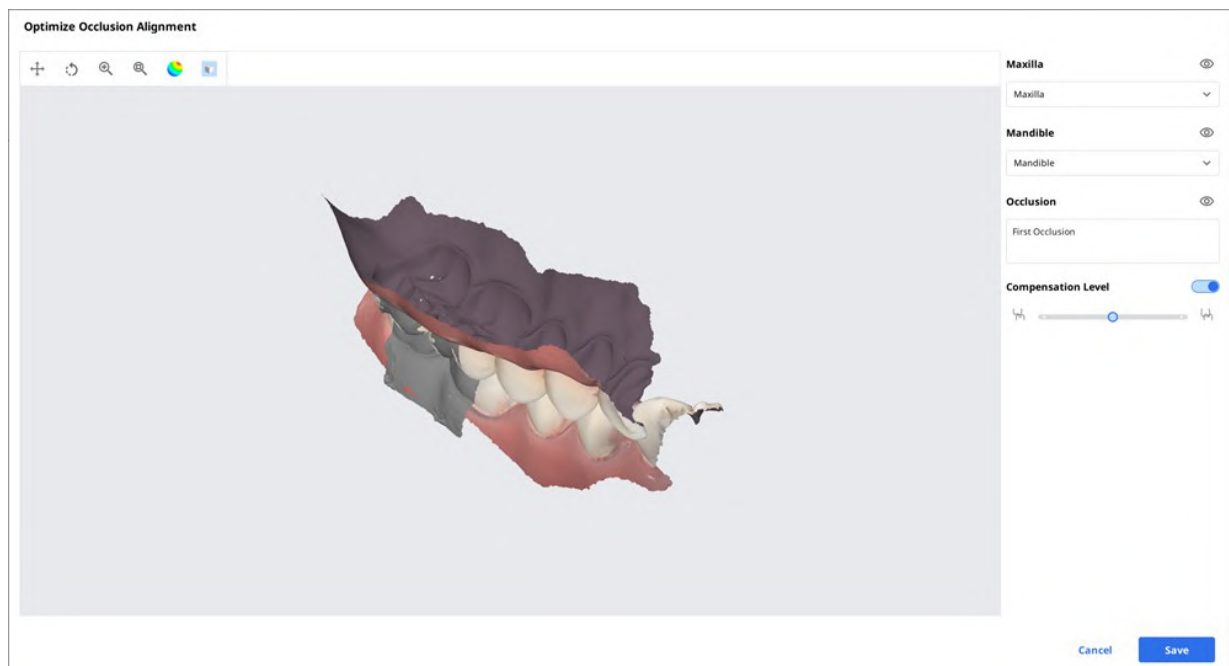


مستوى التعويض

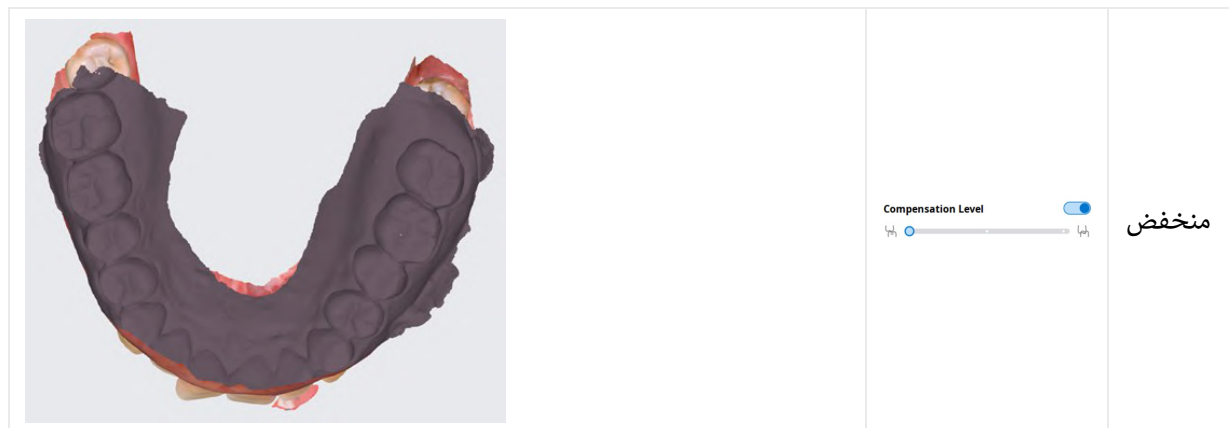

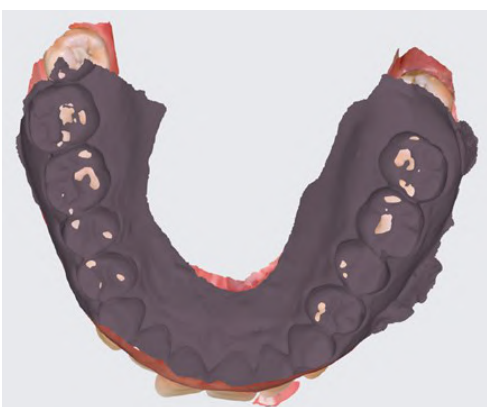		Compensation Level ☒ ☐	متوسط
		Compensation Level ☒ ☐	عالي
		Compensation Level ☐ ☐	غير مفعّل

حركة الفك السفلي

يمكنك تشغيل حركات الفك السفلي المسجلة في Medit Scan for Clinics لرؤية تلامست الإطباق الديناميكية بين الأسنان العلوية والسفلية.

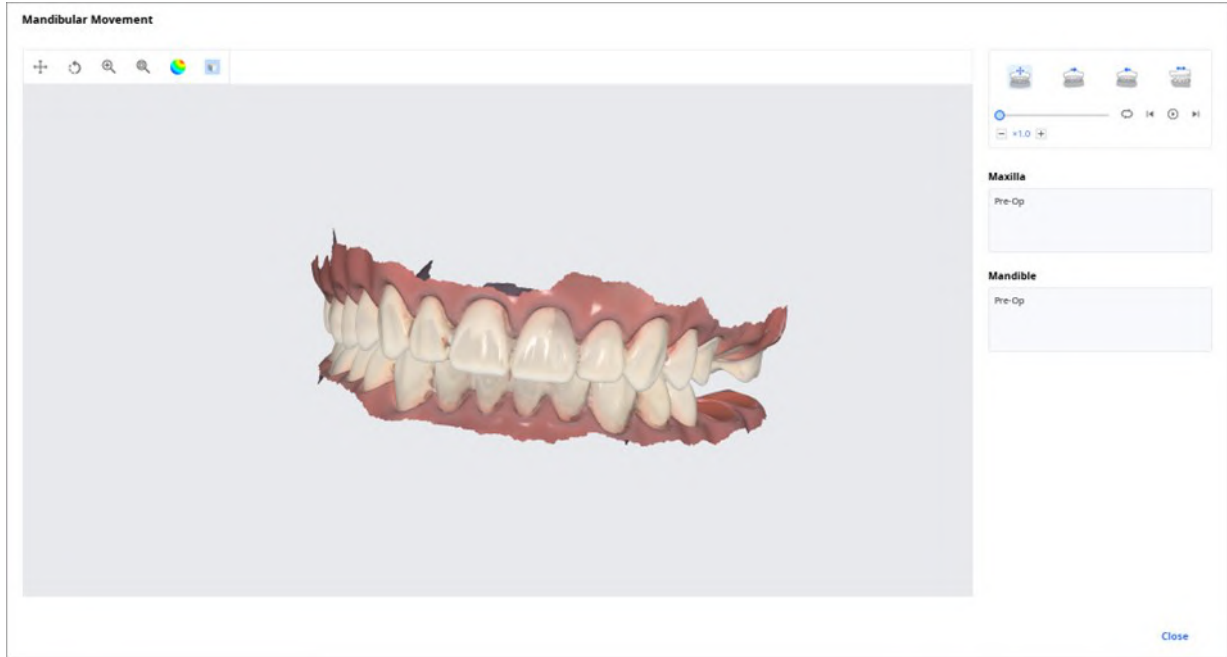

تشغيل تسجيل حركة الفك السفلي الحرة.	الحركة الحرة	
قم بتشغيل تسجيل الفك السفلي وهو يتحرك إلى اليسار.	الحركة الجانبية اليسرى	
قم بتشغيل تسجيل الفك السفلي وهو يتحرك إلى اليمين.	الحركة الجانبية اليمنى	
قم بتشغيل تسجيل الفك وهو يتحرك إلى الأمام.	الحركة التبارزية	

إدارة بيانات الإطباق المتعدد في عارض الملفات

يمكنك الحصول على نتائج متعددة لبيانات الإطباق من تطبيق Medit Scan.

يوفر Medit Link وظيفة لإدارة النتائج من خلال "عارض الملفات".

كيفية إدارة نتائج متعددة

عندما يحصل المستخدم على نتائج إطباق متعددة من Medit Scan for Clinics، يوفر Medit Link خيار تحديد نتيجة.

يتم سرد قائمة النتائج بالاسم، ويمكنك تحديد عنصر واحد.

سيظهر النموذج المحدد في "شجرة البيانات" و "منطقة عرض النموذج".



Occlusal Relationship 1
Occlusal Relationship 2
Occlusal Relationship 3
Occlusal Relationship 4
Occlusal Relationship 5

يمكنك طي القائمة وتغيير العنصر باستخدام رموز الأسهم.



Occlusal Relationship 1 < >

خيارات العرض

يمكنك تغيير خيارات العرض لتخصيص تخطيطات قائمة الحالات في Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

View Options

 Status Filters	2 in use >
 Table Items	8 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

فلتر الحالة

إظهار أو إخفاء كل فلتر يمثل حالة الحالة. لا يتم عرض فلتر الحالة المخفية على الشاشة في Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

يمكنك بسهولة العثور على الحالة التي تحتاجها باستخدام فلتر الحالة.

- يمكنك النقر على الحالة التي تريد عرضها لعرض الحالات في تلك الحالة فقط.
- يمكنك تحديد حالات متعددة في وقت واحد.

تتوفر خيارات الفلتر التالية لكل box:

فلتر الحالة	Box
All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed	Case Box
All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed	Order Box
All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed	In Box
All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done	Work Box

عناصر الجدول

حدد العناصر المراد عرضها في قائمة الحالات في Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. يمكنك تغيير ترتيب عناصر الجدول أو ضبط عرض عمود الجدول في عرض القائمة لتحسين بيئة المستخدم.

تتوفر عناصر الجدول التالية لكل box:

عناصر الجدول	Box
اسم المريض / رقم تعريف المريض / الجنس / عدد الحالات / تاريخ التسجيل / تاريخ الولادة	Patient

Case Box	الحالة / اسم الحالة / تاريخ الولادة / معلومات التسجيل / تاريخ اخر تحديث / تاريخ المسح / تاريخ الطلب / اسم المختبر
Order Box	الحالة / اسم الحالة / اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر / تاريخ التسليم المطلوب / تاريخ اخر تحديث
In Box	الحالة / اسم الحالة / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب / تاريخ اخر تحديث / اسم العيادة
Work Box	الحالة / اسم الحالة / اسم المريض / معلومات التسجيل / تاريخ اخر تحديث / تاريخ التسليم المطلوب / تاريخ المسح الضوئي / اسم العيادة / تاريخ الطلب

نوع العرض

قم بتغيير نوع العرض بين العرض في صورة معرض والعرض في صورة قائمة في Case Box.

تتوفر خيارات نوع العرض التالية لكل box:

Box	خيارات نوع العرض
Patient	العرض في صورة قائمة
Case Box	العرض في صورة قائمة / العرض في صورة المعرض
Order Box	العرض في صورة قائمة
In Box	العرض في صورة قائمة
Work Box	العرض في صورة قائمة

التجميع

حدد خيار تجميع لتصنيف الحالات في القائمة وإعادة ترتيبها حسب الخيار المحدد.

لكل box، تتوفر خيارات التجميع التالية:

Box	خيارات التجميع
Case Box	لا شيء / اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب
Order Box	لا شيء / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب
In Box	لا شيء / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب
Work Box	لا شيء / تاريخ التسليم المطلوب

ملحوظة

لا تتوفر خيارات التجميع في Patient، Case Talk و Trash Box.

الفرز

حدد خيار الفرز لتغيير ترتيب الحالات في القائمة وفقاً للخيار المحدد.

لكل box، تتوفر خيارات الفرز التالية:

Box	التجميع	خيارات الفرز
-----	---------	--------------

اسم المريض / رقم تعريف المريض / تاريخ الولادة / تاريخ التسجيل / عدد الحالات	-	Patient
اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر	لا شيء	Case Box
تاريخ اخر تحديث / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر	اسم المريض	
اسم المريض/تاريخ اخر تحديث/تاريخ الطلب/اسم المختبر	تاريخ المسح الضوئي	
اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / تاريخ المسح الضوئي / اسم المختبر	تاريخ الطلب	
اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب / اسم المختبر	لا شيء	Order Box
اسم المريض / تاريخ الطلب / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم المختبر	تاريخ المسح الضوئي	
اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ التسليم المطلوب / اسم المختبر	تاريخ الطلب	
اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر	تاريخ التوصيل المطلوب	
اسم المريض / تاريخ الطلب / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم العيادة	لا شيء	In Box
اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ التسليم المطلوب / اسم العيادة	تاريخ الطلب	
اسم المريض / تاريخ الطلب / اسم العيادة	تاريخ التوصيل المطلوب	
اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم العيادة	لا شيء	
اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / اسم العيادة	تاريخ التوصيل المطلوب	Work Box

ملحوظة

لا تتوفر خيارات الفرز في Case Talk و Trash Box.

الفلتره والبحث

فلتره حسب المريض

فلتره وعرض الحالات حسب اسم المريض. يمكنك إنشاء قائمة عن طريق فلتره المرضى الذين تحتاج إلى العمل عليهم فقط.

MEDIT Link

Case Box Patient

☒ All ☐ Form Only ☐ Need Processing ☐ Scan Completed ☐ CAD ☐ Ordered ☐ Case Completed

1. أدخل اسم مريض.

Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. اختر المرضى من بين نتائج البحث أدناه.

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. يتم عرض حالات المرضى المختارين فقط في القائمة.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - + 2

Dashboard Patient Case Box Order Box Case Talk App Box Trash Box

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

Total Cases: 20 2018-01-01~2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

الفترة حسب التاريخ

قم بفلتر وعرض الحالات التي تم تعديلها خلال المدة المحددة.

1. انقر على فلتر المدة.

2020-08-10 ~ 2020-09-09

2. حدد المدة من القائمة.

- الكل: إظهار كل الحالات.
- النطاق المخصص: حدد تاريخي البدء والانتها لعرض الحالات التي تم تعديلها خلال الفترة.
- اليوم: اعرض الحالات التي تم تعديلها اليوم.
- أمس: اعرض الحالات التي تم تعديلها أمس.
- الأيام السبعة الماضية: اعرض الحالات التي تم تعديلها آخر مرة خلال السبعة أيام السابقة باستثناء اليوم.
- آخر 30 يوم: عرض الحالات التي تم تعديلها خلال آخر 30 يومًا باستثناء اليوم.
- هذا الشهر: عرض الحالات التي تم تعديلها آخر مرة خلال هذا الشهر.
- الشهر الماضي: عرض الحالات التي تم تعديلها خلال الشهر الماضي.

سيتم تحديث قائمة الحالات في الوقت الفعلي مع الحالات التي تم إنشاؤها أو آخر تعديل لها خلال المدة المحددة.

إمكانات البحث المتقدم

استفد من إمكانات البحث للعثور بسرعة على المعلومات التي تريدها.

All Search / Contains

تتوفر معايير البحث التالية لكل box:

الكل، اسم المريض، رقم تعريف المريض	Patient
الكل، اسم الحالة، اسم المريض، رقم تعريف المريض، معلومات التسجيل، اسم المختبر	Case Box
الكل، اسم الحالة، اسم المريض، رقم تعريف المريض، اسم المختبر، رقم تعريف الطلب	Order Box
الكل، اسم الحالة، اسم المريض، اسم العيادة،	In Box
الكل، اسم الحالة، اسم المريض، معلومات التسجيل، اسم العيادة، رقم تعريف الطلب	Work Box
اسم Case Talk (يحتوي)، اسم المريض (يساوي)	Case Talk
الكل، اسم الحالة، اسم المريض، اسم المختبر، حذف بواسطة (العيادة)	Trash Box

الكل، اسم الحالة، اسم المريض، اسم العيادة، حُذف بواسطة	Trash Box (المختبر)
--	------------------------

يمكنك تحديد معايير البحث والاختيار بين منطق "يحتوي" و "يساوي".

All
All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

إنشاء / تعديل / استنساخ / حذف الحالات

إنشاء حالات

إنشاء حالات في Case Box (العيادة)

1. انقر على "حالة جديدة" في الزاوية اليمنى العليا.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

2. أدخل المعلومات الأساسية، مثل اسم المريض واسم الحالة.

- إذا أدخلت اسمًا غير موجود في قائمة المرضى، فسيتم إضافة مريض جديد.
- إذا قمت بإدخال اسم موجود في قائمة المرضى، يمكنك اختياره من القائمة.
- في حالة تسجيل حالة لمريض موجود، انقر على رمز قائمة المرضى لاختيار مريض موجود.



- في مربع حوار قائمة المرضى، يمكنك تسجيل مريض جديد أو تعديل معلومات مريض موجود.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medis Link.

AD Search / Company

+ New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wanhuan Chai				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. سيتم ملء اسم الحالة تلقائيًا، ولكن سيظل بإمكانك تغييره.

4. انقر على "تسجيل & مسح" لإكمال تسجيل الحالة ومتابعة المسح.

- تسجيل: سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية. هذا مفيد عند تسجيل حالات متعددة.
- تسجيل & مسح: انتقل إلى تبويب النموذج لتسجيل معلومات النموذج للحالة.

إنشاء حالات في Work Box (المختبر)

1. انقر على "حالة جديدة" في الزاوية اليمنى العليا.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Requested Delivery Date

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Cancel](#) [Register](#)

2. أدخل أو اختر اسم العيادة.

3. أدخل اسم المريض واسم الحالة. سيتم ملء اسم الحالة تلقائيًا، ولكن سيظل بإمكانك تغييره.

4. أدخل تاريخ التسليم المتوقع مع الأخذ في الاعتبار تاريخ انتهاء العمل.

5. بعد تسجيل الحالة، ستتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

تعديل الحالات

تعديل الحالات في Case Box (العيادة)

1. انقر فوق رمز "تعديل" بجوار اسم الحالة.

Edit Case Information

Patient Name*
 

✓ "Test Occlusion 00010101" is selected.

Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
 Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Apply](#)

2. انقر على "بحث" لتغيير اسم المريض. لاحظ أنه لا يمكن تعديله مباشرة؛ بدلاً من ذلك، يمكنك العثور على اسم المريض الذي ترغب في استبدال الاسم الحالي به ويمكنك تعديل معلومات المريض من القائمة.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

[Close](#) [Select](#)

3. تحقق من اسم المريض الذي تريد استبدال الاسم الحالي به.
4. لإنشاء مريض جديد، اضغط على "مريض جديد".
5. استخدم زر "تعديل" لتغيير المعلومات المسجلة عن المريض.
6. انقر على "تطبيق" لإنهاء العملية.

تعديل الحالة في Work Box (المختبر)

1. انقر على "تعديل" بجوار اسم الحالة.

Edit Case Information

Clinic Name*
test

Patient Name*
test

Case Name*
test's Case

Requested Delivery Date
2022-04-18

Tag
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. انقر على "تطبيق" بعد الانتهاء من التعديل.

ملحوظة

لا يمكنك تعديل معلومات الحالات التي تم استلامها من خلال الطلب في In Box.

استنساخ الحالات

استنساخ حالة في Case Box (العيادة)

1. انقر على رمز "استنساخ" في الأعلى.



2. سوف تُسأل عن نوع المعلومات التي ترغب في استنساخها في الحالة الجديدة.

Information

Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. اختر ما إذا كنت تريد نسخ معلومات النموذج فقط أو كل البيانات.

4. عند اكتمال الاستنساخ، سيتم إنشاء حالة باسم "[اسم الحالة] - استنساخ".

استنساخ حالة في Work Box (المختبر)

1. انقر على رمز "استنساخ" في الأعلى.



2. قم بتكرار جميع البيانات لإنشاء حالة جديدة.

3. عند اكتمال الاستنساخ، سيتم إنشاء حالة باسم "[اسم الحالة] - استنساخ".


حذف حالة

حذف حالة (العيادة والمختبر)

1. انقر على رمز "حذف".



2. انقر على "OK" لحذف الحالة.

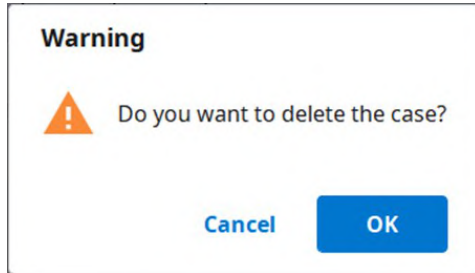

3. يتم نقل الحالات المحذوفة إلى Trash Box ويمكن استعادتها إذا لزم الأمر.

معلومات التسجيل

يمكنك إدخال معلومات النموذج بناءً على البرنامج المتصل ونوع العلاج. سيتم استخدام المعلومات التي تدخلها كمعلومات أساسية للعمل على المسح الضوئي أو برامج CAD والطلب.

تسجيل معلومات التسجيل في Case Box

الإدخال في علامة تبويب النموذج

1. حدد ما إذا كنت ستدخل معلومات العلاج استناداً على الأسنان أو القوس.
2. حدد النوع - الطريقة - المادة - اللون.
 - إذا أدخلت المعلومات بشكل غير صحيح، يمكنك الرجوع لتحديدها مرة أخرى.
 - يتم تسجيل المعلومات المحددة تلقائياً في قائمة الطلبات.
3. انقر فوق "حفظ" لحفظ التسجيل الخاص بك.

الإدخال في علامة تبويب CAD

1. حدد إحدى الخيارات التالية التي ستحدد استراتيجية المسح الخاصة بك: أسنان / Multi-Die / مرن / Multi-Die.
2. حدد رقم السن / القوس / القالب.
3. حدد الإعدادات للخيارات التفصيلية وعمليات CAD.
4. انقر على "OK" لحفظ الإعدادات.
 - يتم تسجيل المعلومات المحددة تلقائياً في قائمة الطلبات.
5. انقر على "حفظ" لحفظ التسجيل الخاص بك.

تسجيل معلومات التسجيل في Work Box

الإدخال في علامة تبويب النموذج

1. حدد برنامج المسح الذي تريد استخدامه.
2. حدد إحدى الخيارات التالية التي ستحدد استراتيجية المسح الخاصة بك: أسنان / Multi-Die / مرن / Multi-Die.
3. قد تختلف الطرق وفقاً لبرنامج المسح المحدد.

Medit Scan for Labs	Medit Scan for Clinics	
O	O	الأسنان
O	O	القوس
O	X	Multi-Die مرن
O	X	Multi-Die


4. حدد أرقام الأسنان، القوس أو القالب لعملية المسح.
5. حدد النوع - الطريقة - المادة - اللون.
 - إذا أدخلت المعلومات بشكل غير صحيح، يمكنك الرجوع لتحديدها مرة أخرى.
 - يتم تسجيل المعلومات المحددة تلقائياً في القائمة.
6. انقر فوق "حفظ" لحفظ التسجيل الخاص بك.

الإدخال في علامة تبويب CAD

1. حدد إحدى الخيارات التالية التي ستحدد استراتيجية المسح الخاصة بك: أسنان / Multi-Die / مرن / Multi-Die.
2. حدد رقم السن / القوس / القالب.
3. حدد الإعدادات للخيارات التفصيلية وعمليات CAD.
4. انقر على "OK" لحفظ الإعدادات.
5. انقر على "حفظ".

توصيل الأسنان بجسر

يمكنك توصيل عدة أسنان بجسر عند تطبيق نفس المادة على عدة أسنان متجاورة. انقر على رمز الجسر بجانب الأسنان المحددة لتوصيلها أو فصلها.

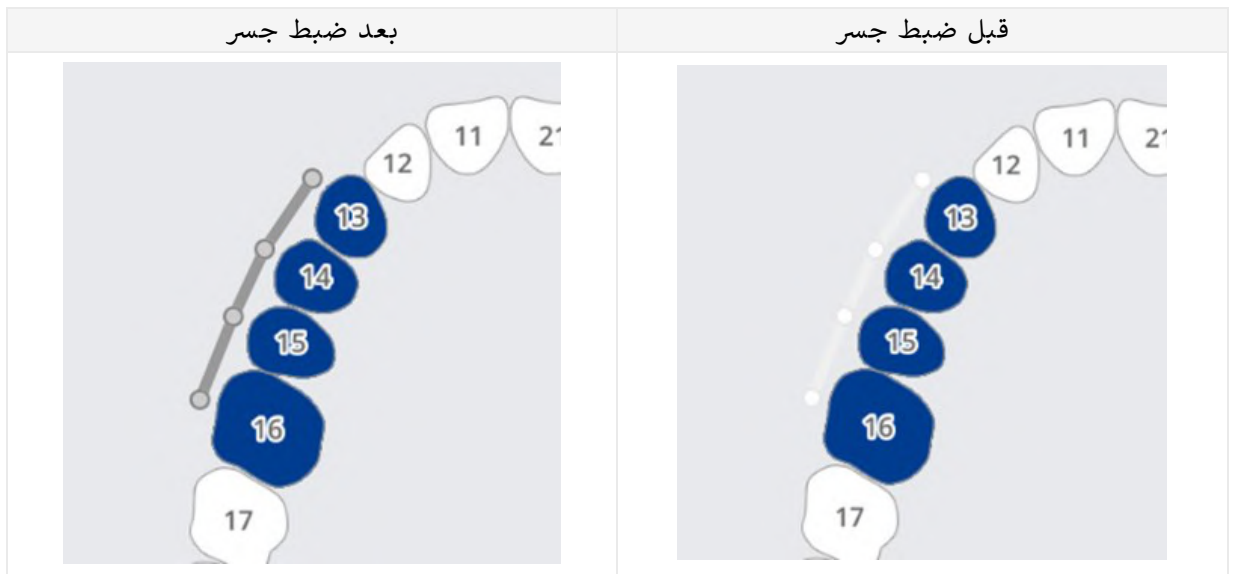

ضبط خيارات المسح

اعتمادًا على البرنامج الذي تعمل به، يتم توفير خيارات مسح مختلفة.

يتم تمرير خيارات المسح المحددة لكل برنامج مسح ضوئي.

Medit Scan for Labs

خيارات عامة

قم بتمريك الأسنان المحضرة والمجاورة وقم بتمرير هذه المعلومات إلى برنامج المسح.	الأسنان المجاورة	
قم بتعليم المقابل تلقائيًا وتمرير هذه المعلومات إلى برنامج المسح.	المقابل	
قم بعرض خيارات تحديد المفصلة في برنامج المسح.	المفصلة	
اسمح باستخدام استراتيجية المسح "حركة الفك" في برنامج المسح.	دليل الحركة	

خيارات بالأسنان

	دليل الزرعة	اسمح بتعيين استراتيجية لمسح دلائل الزرعات في برنامج المسح.
	مسح ما قبل العملية	اسمح بتعيين إستراتيجية لمسح نموذج ما قبل العملية في برنامج المسح.
	مسح النموذج الشمعي	اسمح بوضع استراتيجية لمسح النماذج الشمعية في برنامج المسح.

الإضافة إلى المفضلات

يمكنك تحديد منتج سريعًا عن طريق تسجيله كمنتج مفضل.

تتم إدارة قائمة المفضلات المسجلة كقالب ويمكن مشاركتها من خلال ميزات التصدير والاستيراد.

الإضافة إلى المفضلات

1. حدد رقم السن.
 2. حدد النوع - الطريقة - المادة - اللون.
 - يمكن تسجيل النوع - الطريقة - المادة - اللون كمفضلة حتى إذا لم يتم تحديد جميعها.
 3. انقر على رمز "النجمة".
- ☆
4. توجد مجموعة من المعلومات المحددة، باستثناء رقم السن، في قائمة البحث عن المفضلات.

إدارة القوالب المفضلة

يمكنك تسجيل أنواع مختلفة من القوالب وإدارتها ومشاركتها.

أضف	أضف قالبًا جديدًا.
إعادة تسمية	أعد تسمية قالب الحالي.
حذف	احذف قالب الحالي.
تصدير	تصدير قالب الحالي إلى ملف.
إستيراد	إستيراد ملف قالب.

العمل على المسح/CAD

عملية المسح

بناءً على المعلومات التي تم إدخالها، يمكنك متابعة المسح.

1. أدخل/احفظ معلومات العلاج وحدد خيارات المسح اللازمة.
2. انقر على "مسح" في الزاوية العلوية اليمنى من النافذة.

عملية CAD

تم دمج Medit Link مع exocad.

CAD	تسجيل معلومات العلاج	تأكيد معلومات العلاج	تنفيذ CAD مباشر	استيراد نتائج CAD إلى Medit Link
exocad	O	O	O	O

1. في الإعدادات > تحديد البرنامج المُتَّصِل، يمكنك ربط برنامج CAD الذي تختاره من القائمة.
2. أدخل/احفظ معلومات المهمة وخيارات التصميم في علامة تبويب CAD.
3. انقر على "CAD" في الزاوية العلوية اليمنى من النافذة.
4. يتم تشغيل برنامج CAD المرتبط، ويتم إرسال البيانات تلقائيًا.
5. احفظ النتائج بعد أداء CAD.

ملحوظة

لا يدعم Medit Link على Mac وظيفة الارتباط بـ CAD.

الحصول على ملفات النتائج

تصدير ملفات نتائج المسح

بالإضافة إلى مشاركة النتائج مع الشركاء من خلال الطلبات، يتيح لك Medit Link تخزين ملفات النتائج الخاصة بك بتنسيق الملف المطلوب باستخدام وظيفة التصدير.

Export files in case

OptionsFile List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close


Export

تصدير الملفات إلى	حدد المسار الذي تريد تخزين ملفات النتائج فيه.
إسم المجلد	يقوم النظام بإنشاء مجلد جديد ويقوم بتخزين جميع ملفات النتائج فيه. يتم تعيين اسم المجلد الافتراضي بواسطة قاعدة التسمية. ولكن يمكنك تغيير اسم المجلد مباشرة. يمكنك تحديد قاعدة التسمية في الإعدادات < خيارات التصدير > قواعد اسم المجلد.
اسم الملف	قم بتعيين اسم الملف للنتيجة. تحدد قاعدة التسمية اسم الملف الافتراضي. ولكن يمكنك تغيير اسم الملف مباشرة. يمكنك تحديد قاعدة التسمية من خلال الإعدادات < خيارات التصدير > قواعد اسم الملف
نوع CAD	حدد برنامج CAD المراد استخدامه لبرنامج التصميم الخاص بك. سيقوم Medit Link بضبط الملفات بناءً على هذا التحديد، مما يتيح لك متابعة التصميم دون أي محاذرة إضافية للمحور.
صيغة الشبكة	حدد تنسيق ملف الشبكة.
تنسيق الصورة	حدد تنسيق ملفات الصور المصدرة.
ضغط الملفات	اضغط جميع النتائج في ملف واحد.
جمع الشبكات الفردية	اجمع بين نتيجة الفك العلوي أو الفك السفلي مع الأسنان الفردية. مفيد عندما يكون استيراد عدة ملفات إلى برنامج غير ممكن.


تصدير كافة العلاقات الإطباقية	عندما يتم إنشاء نتائج إطباق متعددة من خلال تطبيق المسح، يمكنك تصدير جميع نتائج الإطباق بمرة واحدة.
حفظ معلومات الحالة كملف PDF	حفظ معلومات الحالة بصيغة pdf مع النتيجة.

تصدير ملفات النتائج من قائمة الحالات


يمكنك تصدير ملفات النتائج لحالة أو حالات متعددة في وقت واحد باستخدام الخيار "تصدير" الموجود أعلى قائمة الحالات في Case Box و In Box.

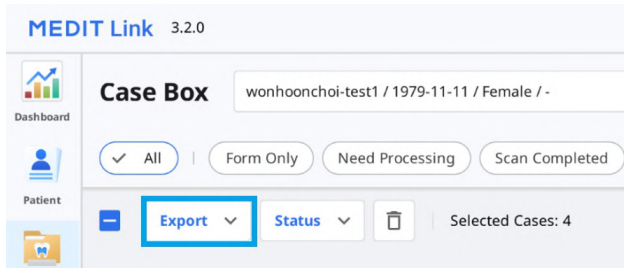

1. انتقل إلى In Box أو Work Box.
2. حدد جميع الحالات التي تريد تصدير ملفات النتائج منها من القائمة.

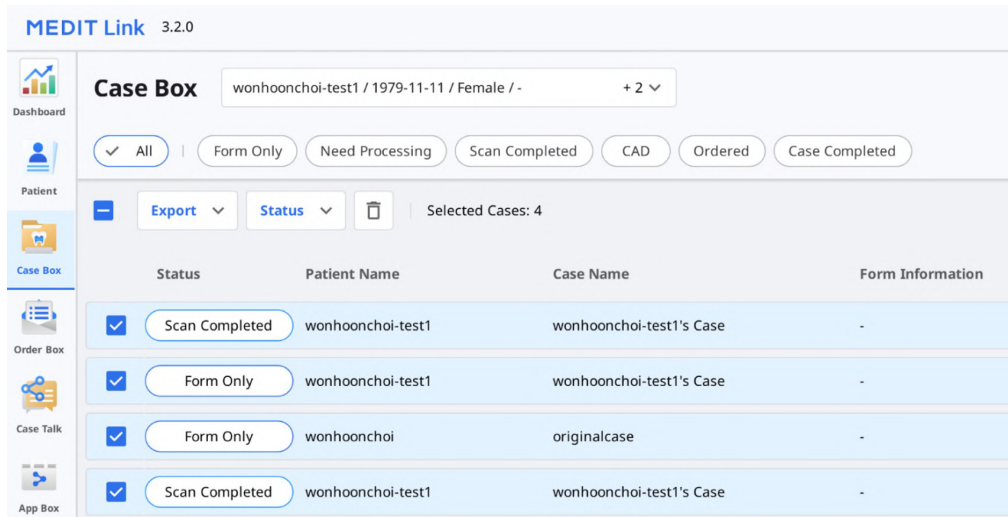

3. انقر على "تصدير" واختر "ملفات النتائج".

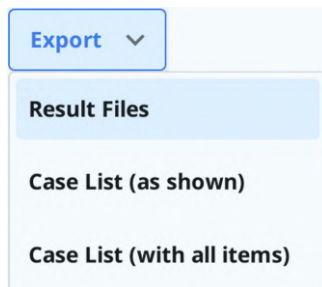

4. قم بتعيين المجلد الوجهة، نوع الملف، تنسيق الشبكة، وتنسيق الصورة، وحدد خيارات التصدير في تبويب "الخيارات".

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type
Medit

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close Export

ملحوظة

لا يمكن تعديل حقل "اسم المجلد" و "اسم الملف" عند تصدير الملفات لحالات متعددة. يتم إنشاء اسم المجلد واسم الملف تلقائيًا وفقًا للقواعد التي قمت بتعيينها لـ "قاعدة اسم المجلد" و "قاعدة اسم الملف" في الإعدادات > خيارات التصدير.

5. انقر على "تصدير".

6. انقر على "نعم" لفتح المجلد الذي تم حفظ الملفات فيه.


Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

تصدير ملفات النتائج من عارض الملفات

يمكنك تصدير ملفات نتائج المسح لحالة باستخدام أيقونة "تصدير" في الزاوية اليمنى العليا من تبويب "عارض الملفات".

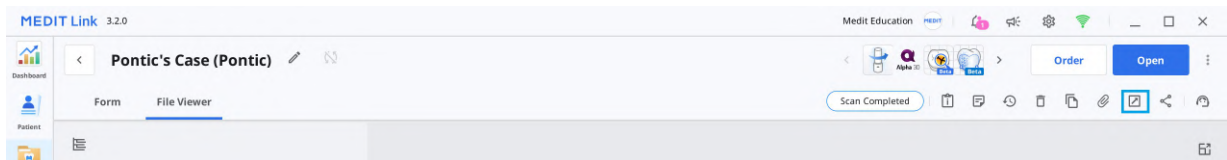

1. انتقل إلى In Box أو Work Box.

2. انقر لفتح حالة من القائمة.

3. انقر على أيقونة "تصدير" في الزاوية اليمنى العليا من تبويب "عارض الملفات".



4. قم بتعيين المجلد الوجهة، اسم المجلد، اسم الملف، نوع الملف، تنسيق الشبكة، وتنسيق الصورة، وحدد خيارات التصدير في تبويب "الخيارات".

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

5. في تبويب "قائمة الملفات"، يمكنك تحديد الملفات المطلوبة للحالة عن طريق إلغاء تحديد الملفات غير الضرورية.

Export Files in This Case

Options File List

☒

☒ Maxilla
☒ Base

☒ Mandible
☒ Base

☒ Occlusion
☒ First Occlusion
☒ Second Occlusion

☒ Dynamic Occlusion
☒ Free
☒ Maxilla
☒ Mandible

☒ Face Scan Data
☒ Face Scan Data

Close Export

6. انقر على "تصدير".

7. انقر على "نعم" لفتح المجلد الذي تم حفظ الملفات فيه.


Question

Exporting successfully completed.
 Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

تصدير ملفات النتائج من شجرة البيانات


يمكنك تصدير ملف أو ملفات إلى مجموعة بيانات معينة من القائمة الموسعة في عارض الملفات.

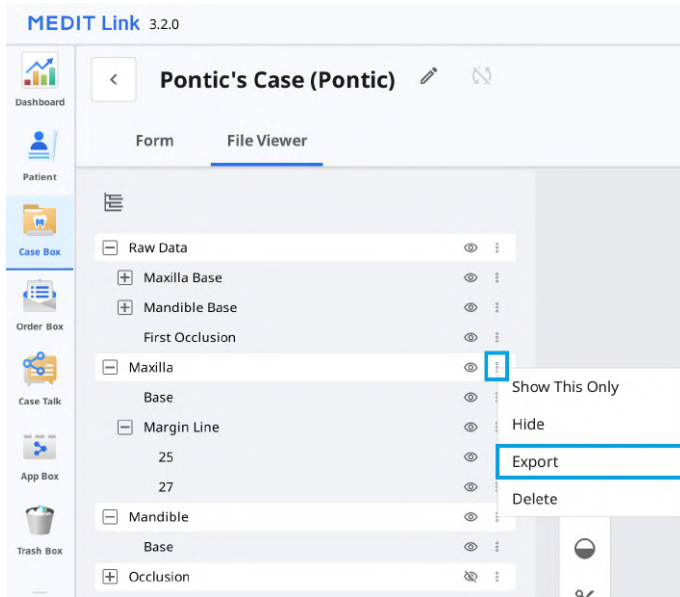

1. انتقل إلى In Box أو Work Box.
2. انقر لفتح حالة من القائمة.
3. انقر على أيقونة النقاط الثلاث بجوار مجموعة البيانات أو على كيان في شجرة البيانات في تبويب عارض الملفات.

...

4. ثم انقر على "تصدير".

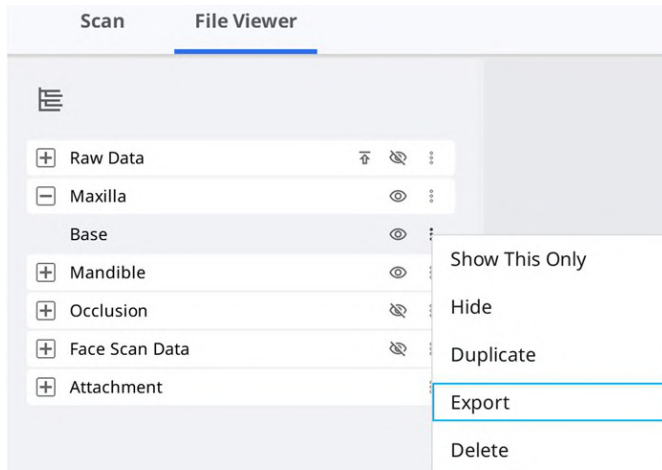

5. قم بتعيين المجلد الوجهة، اسم المجلد، اسم الملف، نوع الملف، تنسيق الشبكة، وتنسيق الصورة، وحدد خيارات التصدير في تبويب "الخيارات".

Export files in case

Options File List

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

6. يمكنك رؤية أن الملفات التي اخترتها في شجرة البيانات فقط هي المحددة في قائمة الملفات.

Export Files in This Case

Options File List

☐ Maxilla
☐ Base
☒ Mandible
☒ Base
☐ Occlusion
☐ First Occlusion
☐ Second Occlusion
☐ Dynamic Occlusion
☐ Free
☐ Maxilla
☐ Mandible
☐ Face Scan Data
☐ Face Scan Data

Close Export

7. انقر على "تصدير".

8. انقر على "نعم" لفتح المجلد الذي تم حفظ الملفات فيه.

Question

 Exporting successfully completed.
 Do you want to open the folder containing the exported file?


No Yes

تصدير قائمة الحالات كملف CSV


يوفر Medit Link وظيفة لتصدير قائمة الحالات بتنسيق CSV.

يمكنك تصدير قائمة الحالات بالمعلومات الأساسية وإدارة الحالات بسهولة.

1. انتقل إلى In Box أو Work Box.
2. حدد الحالات التي تريد تصديرها.

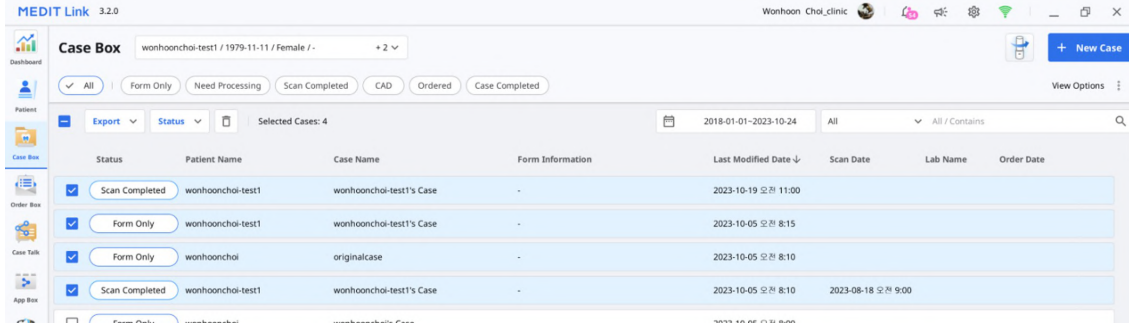

3. انقر على "تصدير" وحدد "قائمة الحالات (كما هو موضح)" أو "قائمة الحالات (مع كافة العناصر)".

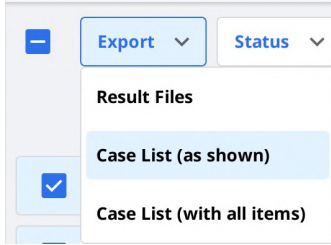

ملحوظة

قائمة الحالات (كما هو موضح): قم بتصدير قائمة الحالات بالعناصر المعروضة حاليًا على الشاشة. اذهب إلى خيارات العرض > عناصر الجدول لإظهار العناصر أو إخفاؤها حسب رغبتك.
قائمة الحالات (بكل العناصر): قم بتصدير قائمة الحالات بكل العناصر، بما في ذلك الحالة، اسم الحالة، تاريخ الميلاد، معلومات النموذج، تاريخ آخر تعديل، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب واسم المختبر.

4. حدد المسار واسم الملف، ثم احفظ القائمة.

5. يتم حفظ قائمة الحالات كملف CSV.

تصدير خط الإنهاء


يوفر Medit Scan for Clinics وظيفة لإنشاء خط الإنهاء، ويمكن لـ Medit Link نقل خط الإنهاء إلى برنامج CAD.

تصدير خط الإنهاء كلون

بشكل عام، يحول Medit Link خط الإنهاء إلى لون ويصدر النتيجة مع الفك العلوي أو الفك السفلي معًا. يمكنك إنشاء خط الإنهاء في CAD بالإشارة إلى معلومات اللون.

مثال:

الفك العلوي

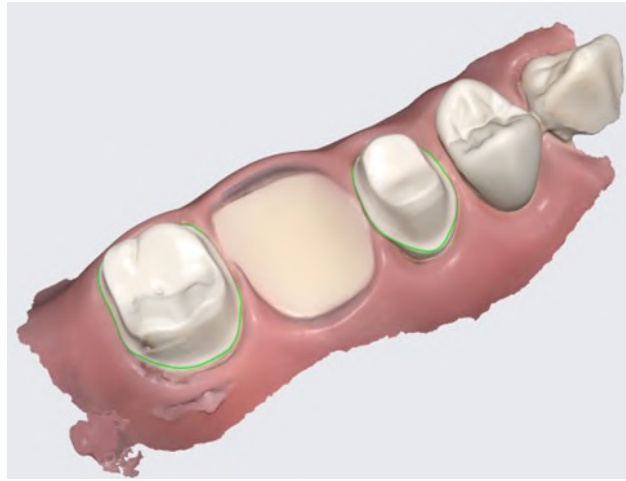

النتيجة بخطوط الإنهاء كمعلومات لونية

ملحوظة

تتوفر هذه الميزة للتنسيقات التي تتضمن معلومات الألوان، مثل OBJ، meditMesh وPLY. لا يتم تحويل خط الإنهاء إلى STL.



ملحوظة

نوع 3shape > CAD لا يدعم هذه الميزة.

تصدير خط الإنهاء كملف

في حالة Exocad، يقوم Medit Link بتصدير خط الإنهاء إلى "margin.xyz" والذي يمكن استيراده إلى exocad مباشرة. يمكنك استخدام هذا الملف في exocad دون عمل إضافي.

مثال:

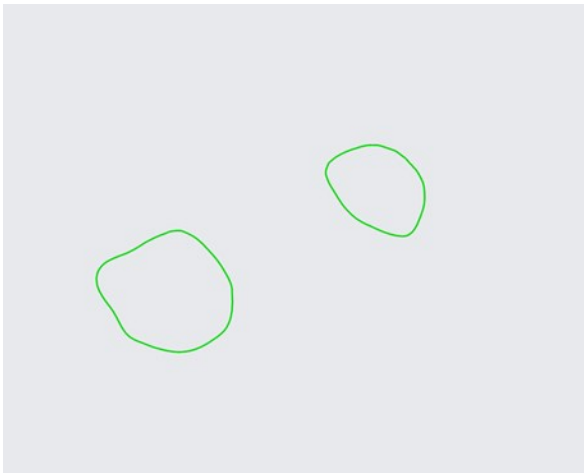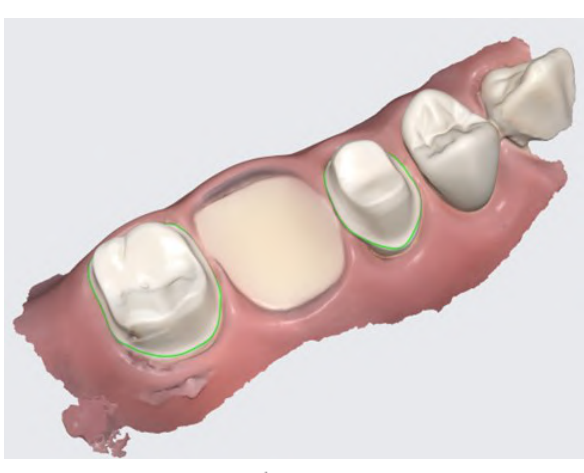خط الإنهاء	الفك العلوي
 خطوط الإنهاء مصغرة كملفات فردية	 النتيجة بخطوط الإنهاء كمعلومات لونية

تنزيل ملفات من موقع Medit Link

يوفر Medit Link وظيفة تنزيل.

إذا كنت ترغب في الحصول على ملفات النتائج دون تثبيت تطبيق Medit Link، يمكنك تنزيل الملفات من خدمة موقع Medit Link.

ملحوظة


يجب تحميل البيانات على سحابة Medit لتنزيل الملفات من الموقع.

تتوفر وظيفة التنزيل في القائمة التالية على موقع Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

يمكنك العثور على زر "تنزيل" في الجزء العلوي الأيمن.

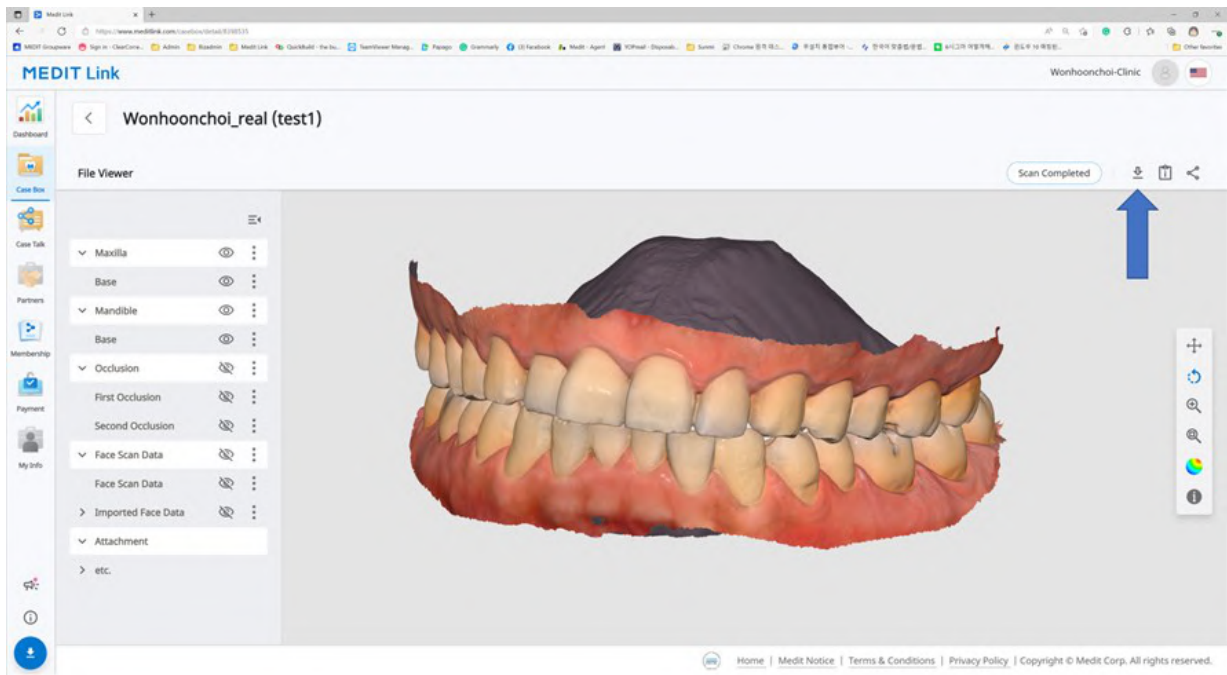

Web Viewer

عند مشاركة الحالة باستخدام Case Talk، يمكنك تعيين ما إذا كنت ستسمح بالتنزيل أم لا.

إذا قمت بتحديد "منح إذن التنزيل" وشاركت الحالة، سيتمكن جميع المستخدمين الذين يتصلون بالرابط المشترك من تنزيل الملفات.

Share through Case Talk

Share with Anyone

1 Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

2 You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code Enter PIN Code

3 Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

4 If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

5 The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

6 If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment


Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link

في الWeb Viewer، يمكنك العثور على رمز "تنزيل" في الجزء العلوي الأيسر.

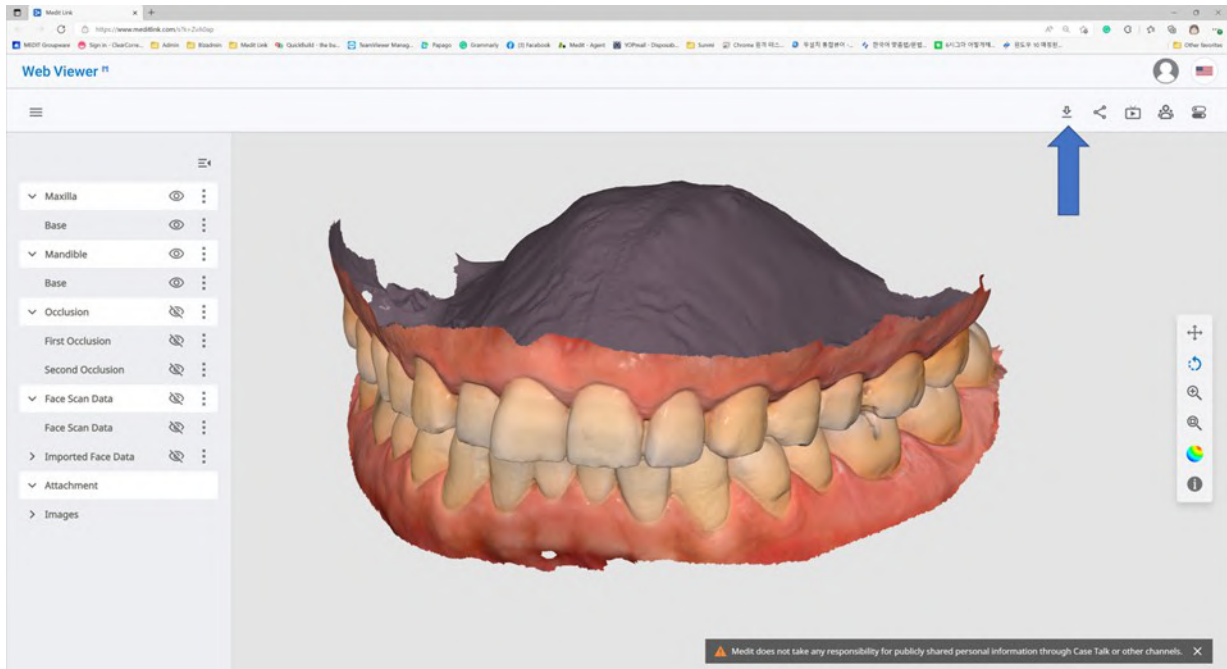

1. انقر على "تنزيل".



2. حدد تنسيق الشبكة من مربع حوار التنزيل.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close **OK**

3. ثم انقر على "OK".

طلب/إدارة الطلبات

يمكنك بسهولة طلب حالة بيانات تم الحصول عليها من برامج متصلة وإرفاقها من قبل المستخدم.

طلب حالات

يمكنك تقديم طلب لشركائك في Case Box.

1. انقر على الزر "طلب".
2. تحقق من المعلومات المطلوبة لطلبك.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage

Seoul, KR

[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea

01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

3. اختر شريك.
4. تحقق من معلومات المنتج من علامة تبويب قائمة الطلبات.
 - يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد مشاركة اسم المريض.
5. تحقق من الملفات للطلب من علامة تبويب قائمة الملفات.
6. أدخل تاريخ التسليم المطلوب.
 - يتم تعيين القيمة الافتراضية على 7 أيام بعد تاريخ الطلب.
7. يمكنك إضافة مذكرة وعلامات لشريكك لتوضيح تفاصيل محددة.
8. عندما يتم إنشاء العديد من نتائج الإطباق على تطبيق المسح، يمكنك إرسال جميع نتائج الإطباق مرة واحدة عن طريق تحديد "ترتيب كافة العلاقات الإطباقية".
9. تابع طلبك.

تأكيد الطلب (In Box)

- اقبل الطلب عند استلامه.
- سيتم إعادة توجيه الطلبات المقبولة إلى Work Box.

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Order File Viewer

Reject Confirm Order

Pending

إلغاء الطلب (Order Box)

- يمكنك إلغاء الطلب قبل أن يقبله شريكك.
- يمكن إعادة طلب الحالات الملغاة.

test's Case (test)

Order File Viewer

Cancel

Pending

رفض طلب (In Box)

- يمكنك رفض طلب مستلم.
- يمكن إعادة طلب الحالات المرفوضة.

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Order File Viewer

Reject Confirm Order

Pending

التحقق من الحالات المطلوبة

يمكنك التحقق من تفاصيل الحالة التي طلبتها من Order Box في حساب العيادة. يمكنك أيضًا التحقق من الحالة التي تلقيتها من In Box في حساب المختبر.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi

test's Case - Clone / wh-clinic-ds...

Order File Viewer

Accepted

Order ID: 13455074

Patient Name: *** Partner Name: wh-clinic-dso-3

Scanned Date: 2023-08-04 오후 1:58 Order Date: 2023-10-26 오후 4:38

Requested Delivery Date: 2023-11-02 Expected Delivery Date: 2023-11-02

오전 08:00 오후 08:00

Memo

Tags

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade
3	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
4	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
5	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade
6	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Shade

المعلومات التي يمكن تضمينها في الطلب هي كما يلي: رقم تعريف الطلب / اسم المريض / اسم الحساب / تاريخ المسح / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم / تاريخ استحقاق التسليم / المذكرة. يمكنك التحقق من تفاصيل المنتج المطلوب و معلومات التوصيل.	معلومات الطلب
تعرض قائمة الطلب تفاصيل المنتج المطلوب.	قائمة الطلب
أدخل/تحقق من معلومات الشحن.	الشحن

إدخال معلومات الشحن (In Box)

أدخل معلومات الشحن للحالة المكتملة وابدأ الشحن.

1. انقر على علامة تبويب الشحن.

2. أدخل معلومات الشحن وانقر على "تسجيل".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company Tracking Number

Memo

3. يتم إرسال المعلومات المدخلة إلى شريكك.

إدارة تاريخ التسليم

يمكنك تعيين تاريخ التسليم المتوقع عند تقديم طلب، وسيتم إرسال هذه المعلومات إلى شريكك.

تحديد تاريخ التسليم المطلوب (حساب العيادة)

• عند الطلب من Case Box، يمكنك إدخال تاريخ التسليم المطلوب.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.
☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

- المدة الافتراضية هي 7 أيام بعد تاريخ الطلب.
- أدخل التاريخ/الوقت الذي ترغب استلام المنتجات فيه وتابع الطلب.
- يمكنك ضبط الوقت بسهولة باستخدام شريط التمرير.

تحديد موعد التسليم المتوقع (حساب العيادة)

- يمكنك إدخال تاريخ التسليم المتوقع للحالة المطلوبة من In Box.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order ID: 10413603

Patient Name: test Partner Name: Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date: 2022-09-29 오전 7:56 Order Date: 2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date: 2022-10-01 Expected Delivery Date: 2022-10-01

오전 10:30 오전 10:30

Memo

<Scanbody Library>
 16 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
 15 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10
 14 : ODENTIS_Custom_(NMR) ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long_16mm - N-HEX_T10

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total KRW 0

1. تحقق من تاريخ التسليم المطلوب مع الشريك وأعد الجدولة باستخدام الزر "تعديل".



2. أدخل تاريخ التسليم المتوقع مع الأخذ في الاعتبار يوم العمل الفعلي. إذا لزم الأمر، يمكنك ترك تعليق أيضًا.

3. انقر على "تطبيق".

March 2022 >

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. سيتم إعادة توجيه تاريخ التسليم المتوقع والمذكرة مع الطلب.

○ يمكنك التحقق من التاريخ والمذكرات في Order Box.

○ يمكنك تغيير تاريخ التسليم المتوقع، وستتم إعادة توجيه التغييرات إلى شريكك.

5. يمكنك التحقق من سجل الحالة باستخدام زر "سجل".



إكمال الحالة

الإكمال (Work Box/In Box)


بمجرد الانتهاء من جميع المهام، انقر على "Done" لإكمال الحالة.

أكمل حالة من تفاصيل الحالة

يمكنك العثور على أيقونة النقاط الثلاث على اليمين من زر "فتح" أو "إعادة المسح".



أكمل العمل بالنقر على الأيقونة واختيار "Done".

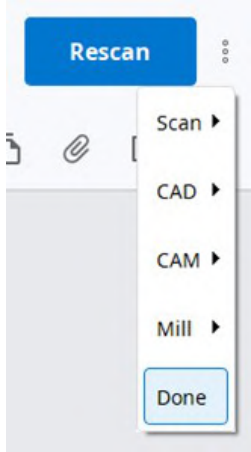

أكمل الحالات المتعددة من قائمة الحالات

1. اذهب إلى Work Box.
2. حدد جميع الحالات التي تريد إكمالها.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard | In Box | **Work Box** | Case Talk | App Box | Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export | Status | Selected Cases: 4

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
Form Only	test's Case	test	-
CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. انقر على "الحالة" وحدد "Done".

الإكمال (Case Box/Order Box)

بعد اكمال الحالة من ناحية المختبر، تحتاج العيادة إلى تأكيد الحالة لإكمال عملية الطلب بأكملها.

يمكن للعيادة العثور على زر "تأكيد التسليم" في Order Box في حالة اكمال المختبر عمله.


انقر على هذا، تكتمل عملية الطلب، وسيتم تغيير حالة الحالة إلى "Case Completed".

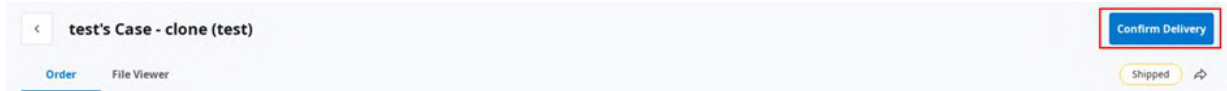

أكمل حالة غير مطلوبة في Case Box

بالنسبة للحالات التي لم يتم طلبها من المختبر، يمكنك إكمال هذه الحالات في Case Box.

1. اذهب إلى Case Box.
2. حدد الحالة التي تريد إكمالها.

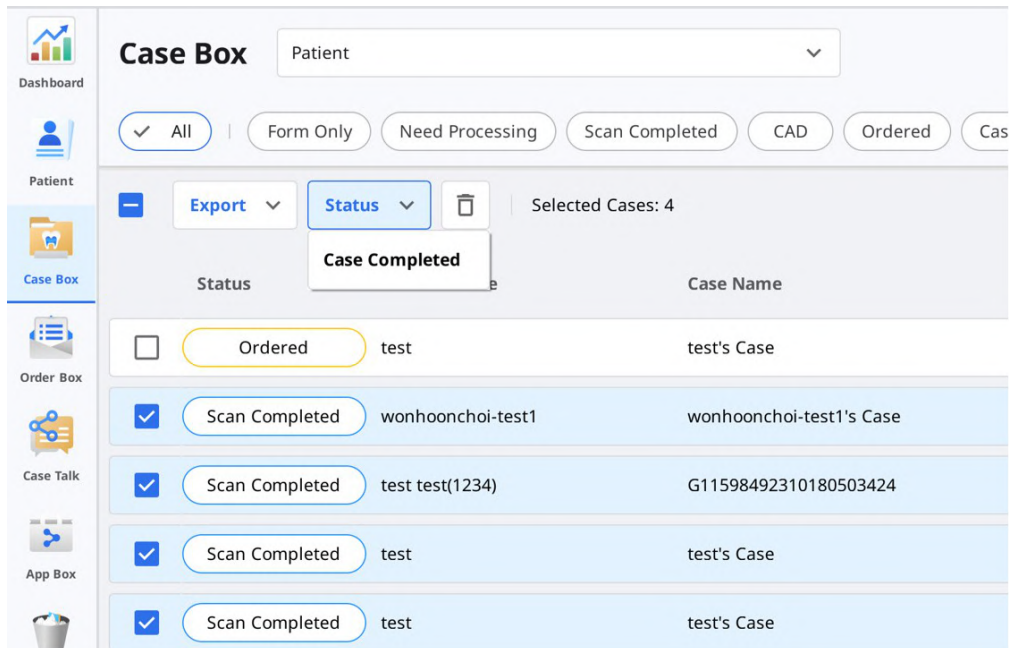

3. انقر على "الحالة" وحدد "Case Completed".

التواصل باستخدام العلامات

يمكنك إضافة معلومات إضافية عن حالتك باستخدام العلامات وإرسالها إلى شركائك.

إضافة علامات عند إنشاء حالة جديدة

يمكنك إدخال علامات عند إنشاء حالة جديدة أو تعديل معلومات الحالة.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#)

[Register](#)

[Register & Scan](#)

يمكنك بسهولة البحث عن وتحديد العلامات التي استخدمتها من قبل.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

إضافة علامات عند الطلب

يمكنك التحقق من العلامات وتعديلها في مربع حوار الطلب أثناء الطلب.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname x Specialmaterial x SpecialComment x

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

تحقق من العلامات في تفاصيل الحالة

MEDIT Link 3.2.0

wonhoon choi

Order Open

Scan Completed

Occlusion Test's Case (Occlusion Te...

Form File Viewer

Raw Data Maxilla Base Mandible Base Occlusion

Occlusal Relationship 1

Memo Edit

Tags Cancel Save

Dr_Name x Worker_Name x

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

+Z

