

USER GUIDE

Medit Link



Table of Contents

Medit Link

Einführung	6
Medit Link	6
Dienst Übersicht	6
Cloud-Dienst	7
Arbeitsablauf-Managementplattform mit Bestellsystem	7

Medit Link > Installation

Systemanforderungen	8
Systemanforderungen für Windows	8
Systemanforderungen für macOS	8
Systemanforderungen für den Web-Dienst	8
Empfohlen für Browser	8
Minimum für mobile Geräte	8
Installation unter Windows	9
Installation unter macOS	11
Medit Link wird als Paket mit Medit Scan for Clinics installiert.	11

Medit Link > Erste Schritte

Registrieren & Anmelden	15
Medit Link Website	15
Registrieren	15
Anmeldung und Willkommenseite	17

Medit Link > Medit Link Web

Übersicht	19
Dashboard	20
Dashboard Übersicht	20
Medit Insights	20
Medit Insights abonnieren	21
Medit Insights abmelden	22
Case Box/Work Box	23
Fall-Filterung	23
Filtern nach Status	23
Filtern nach Dauer	23
Filtern nach Suche	24
Fall Einzelheiten	24
Order Box/In Box	26
Bestelleinheiten	26
Tabs in Order Box/In Box	26
Case Talk	27
Erstellen eines Case Talk	27
Einstellen des Freigabeberechtigungs-Typ und der Freigabeoptionen	28
Case Talk Einzelheiten	30
Web Viewer	30
Anmerkung	31
Kommentare	32
Bildschirmfreigabe in Echtzeit	33
Datenbaum	33
Datenbaum Steuerung	33
3D-Modell-Steuerung	34
Partner	35
Suche nach Partnern	35
Meine Partnerliste	35

Partner-Einladung	36
Mitgliedschaft	37
Mitgliedschaft	37
Mein Abonnement	37
Cloud-Speicher	38
Abonnieren	39
Abmelden	40
Abrechnungs-Informationen	41
So fügen Sie eine Zahlungsmethode hinzu	42
So ändern Sie eine Zahlungsmethode	44
Einlösen	45
Einlösecode registrieren	45
Einlösecode aktivieren	46
Zahlung	46
Zahlungseinzelheiten (Praxis & Labor-Konten)	47
Zahlung Konto-Informationen (nur Labor-Konto)	47
Meine Informationen	47
Mein Konto	48
Meine Organisation (nur Admin-Konto)	48
Mein Scanner	48
Meine Preisliste (nur Labor Admin-Konto)	49
Andere Menü	49
Hinweis & Aktualisierung	50
Medit Informationen	50
Medit Link App herunterladen	50

Medit Link > Medit Link App

Übersicht	51
Box Übersicht	52
Titelleiste	53
Meine Information	54
Benachrichtigungen	54
Fall-Synchronisierungs-Manager	55
Hochladen	56
Herunterladen	56
Netzwerkstatus	57
Menü	57
Dashborad	58
Case Box/Work Box	58
Tabs in der Case Box/Work Box	59
Funktionen in Case Box/Work Box	59
Order Box/In Box	60
Tabs in Order Box/In Box	61
Case Talk	61
App Box	61
Trash Box	62
Einstellungen	62
Patientenverwaltung	62
Neuen Patienten hinzufügen	63
Patienten löschen	63
Patienten zusammenführen	64
Hinweis & Aktualisierung	65
Gehe zu Medit Link Web	65
Medit Informationen	65
Einstellungen	65
Allgemein	66
Speicherverwaltung	67
Zeitraum festlegen	67
Lokale Speicher	67

Cloud-Speicher	68
Verbundenes Programm einstellen	68
Export-Optionen	68
Werkzeug für Fallkonvertierung	70
Wie Sie das Werkzeug für Fallkonvertierung benutzen	70
Proxy-Optionen	72
Über	72
Benutzerhandbuch	73
Datei-Viewer	73
Datenbaum	74
Werkzeuge zur Modellsteuerung	74
3D-Modell-Steuerung	74
2D-Bild-Steuerung	75
Funktion Werkzeuge	75
Bilderfassung und Notiz	75
Kieferorthopädische Erfassung	76
Löcher auffüllen	77
Trimmen	77
Okklusionsausrichtung optimieren	80
Unterkieferbewegung	81
Verwalten der Mehrfache Okklusionsdaten im Datei-Viewer	82
Wie man mehrere Ergebnisse verwalten kann	82
Ansichtsoptionen	83
Status-Filtern	84
Tabellenelemente	85
Ansicht Typ	86
Galerie-Ansicht	87
Listenansicht	88
Gruppierung	88
Sortierung	89
Filtern und Suche	90
Filtern nach Datum	91
Erweiterte Suchfunktionen	91

Medit Link > Arbeitsablauf

Fall erstellen/bearbeiten/klonen/löschen	92
Fälle erstellen	93
Fälle erstellen in Case Box (Praxis)	93
Fälle erstellen in Work Box (Labor)	94
Fälle bearbeiten	94
Fälle bearbeiten in Case Box (Praxis)	94
Fälle bearbeiten in Work Box (Labor)	95
Fälle klonen	95
Fälle klonen in Case Box (Praxis)	95
Fälle klonen in Work Box (Labor)	96
Fall löschen	96
Fall löschen (Praxis und Labor)	96
Formularinformationen	96
Anmelden von Formularinformationen in der Case Box	97
Eingabe auf der Tab Formular	97
Eingabe auf der Tab CAD	97
Anmelden von Formularinformationen in der Work Box	97
Eingabe auf der Tab Formular	97
Eingabe auf der Tab CAD	97
Verbinden von Zähnen zu einer Brücke	98
Scan-Optionen einstellen	98
Medit Scan for Labs	98
Allgemein Optionen	98
Optionen nach Zähnen	98

Zu Favoriten hinzufügen	99
Zu Favoriten hinzufügen	99
Verwalten von Favoriten Schablonen	99
Arbeiten am Scannen/CAD	99
Scanvorgang	100
CAD-Prozess	100
Ergebnisdateien abrufen	100
Scan-Ergebnisdateien exportieren	101
Ausgewählte Dateien exportieren	102
Grenzlinien exportieren	103
Grenzlinie als Farbe exportieren	103
Grenzlinie als Datei exportieren	104
Exportieren der Fall-Liste als CSV	104
So exportieren Sie die Fall-Liste	104
Dateien von Medit Link Web herunterladen	105
Case Box/Work Box	105
Web Viewer	106
Wie Sie herunterladen	107
Fälle bestellen/verwalten	107
Sie können ganz einfach einen Fall mit den von verbundenen Programmen erfassten Daten und den vom Benutzer angehängten Daten bestellen.	108
Fälle bestellen	108
Bestellung bestätigen (In Box)	109
Bestellung abbrechen (Order Box)	109
Bestellung ablehnen (In Box)	109
Prüfung bestellter Fälle	109
Eingabe von Versandinformationen (In Box)	110
Lieferdatum verwalten	110
Angefragtes Lieferdatum einstellen (Praxis-Konto)	110
Fälle abgeschlossen	112
Vervollständigen (Work Box/In Box)	112
Einen Fall aus der Einzelheit heraus abschließen	112
Mehrere Fälle aus der Fall-Liste abschließen	112
Vervollständigen (Case Box/Order Box)	113
Schließen Sie einen nicht geordneten Fall in der Case Box ab	113
Benutzen von Tags für die Kommunikation	114
Tags beim Erstellen eines neuen Falls hinzufügen	115
Tags bei der Bestellung hinzufügen	115
Tags in den Fall Einzelheiten überprüfen	116

Einführung

Medit Link

Medit Link ist ein kollaboratives Werkzeug zur Erleichterung der Kommunikation zwischen Praxen und Laboren, um einen optimierten Arbeitsablauf für jede Partei zu ermöglichen.

Es bietet verschiedene Funktionen, die sich nach Typ und Berechtigungen des jeweiligen Kontos richten. Das Programm bietet eine benutzerfreundliche Benutzer Schnittstelle für die Verwaltung des Arbeitsablaufs, vom Scannen mit Mund- und Modellscannern über die Bestellung von Fällen bis hin zum Entwurf und der Herstellung von Prothesen.

Medit Link besteht aus einem Web-Dienst und einer Computeranwendung.

Dienst Übersicht

		Web	App
		• Konto anmelden und verwalten • Suche • Partner suchen und verwalten • Fälle über Web Viewer mit einem teilbaren Link teilen • Zugriff auf Fälle, die über die App gestellt wurden • Bestellungen verwalten	• Formularinformationen eingeben • Scannen • Bestellungen aufgeben/empfangen und Zahlungen stellen • Mit CAD verknüpfen • Patienten verwalten
Praxis	Administrator	Suchen und verwalten Sie Partner und Ihre Organisation, verwalten Sie Zahlungsinformationen und teilen Sie Fälle. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - Partner - Mitgliedschaft - Zahlung - Meine Informationen	Formularinformationen eingeben, scannen, mit CAD verknüpfen, Bestellungen aufgeben, Zahlungen stellen und Patienten verwalten. - Dashboard - Case Box - Order Box - Case Talk - App Box - Trash Box - Patientenverwaltung
	Mitglied	- Case Box - Case Talk - Meine Informationen	- Case Box - Case Talk - App Box - Trash Box
Labor	Administrator	Suchen und verwalten Sie Partner und Ihre Organisation, verwalten Sie Zahlungsinformationen und teilen Sie Fälle. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - Partner - Mitgliedschaft - Zahlung - Meine Informationen	Formularinformationen eingeben, scannen, mit CAD verknüpfen und Bestellungen empfangen/verwalten. - Dashboard - In Box - Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box
	Mitglied	- Work Box - Case Talk - Meine Informationen	- Work Box - Case Talk - App Box - Trash Box

iHinweis

Der folgende Dienst ist auf Medit Link China nicht verfügbar.

- Zahlung

Cloud-Dienst

Medit Link unterstützt den automatischen Hochladen/herunterladen von Datenbanken und Dateien über AWS (Amazon Web Services).

Die in der Cloud gespeicherten Daten werden automatisch mit den Computern mehrerer Benutzer im Organisation synchronisiert, so dass diese jederzeit von jedem Computer aus auf die gleichen Daten zugreifen können. Cloud-basierte Datensicherung und Wiederherstellung bewahrt all Ihre Daten sicher auf. So sind Ihre Daten auch im Falle eines Datenverlusts aufgrund eines plötzlichen Computerausfalls sicher.

Der Cloud-Dienst ermöglicht es Zahnärzten und Laboren, Daten schnell zu teilen, ohne dass sie die Scans per E-Mail versenden oder manuell übertragen müssen. Alle Daten, einschließlich der Patienteninformation, werden sicher verschlüsselt, gespeichert und übertragen. Medit entspricht den medizinischen Gesetzen und Vorschriften wie HIPAA und GDPR.

Arbeitsablauf-Managementplattform mit Bestellsystem

Medit Link bietet ein eigenes Bestellungs- und Zahlungssystem.

- Mit Medit Link können Sie Verträge zwischen Zahnärzten und Dental-Laboren erstellen und Daten schnell und einfach teilen.
- Sie können den Bestellstatus überprüfen und verwalten.

Das kreditkartengestützte System arbeitet mit Zahlungsmodulen von Online-Zahlungsplattformen wie Stripe (www.stripe.com) und I'mPort (<http://www.iampor.kr>) zusammen und stellt so Zahlungsdienste einfach und bequem bereit.

iHinweis

Der folgende Dienst ist auf Medit Link China nicht verfügbar.

- Zahlung

Systemanforderungen

iHinweis

Bitte beachten Sie die Systemanforderungen für Medit Scan for Clinics und Medit Scan for Labs, wenn Sie die Scan-Software mit Ihrem Scanner benutzen möchten.

Systemanforderungen für Windows

	Laptop & Desktop
CPU	Intel Core i5 2,6 GHz oder höher
RAM	16 GB oder höher
Grafiken	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) oder höher / oder eine gleichwertige AMD-Grafikkarte
OS	Windows 8 64 Bit (nicht verfügbar in 32 Bit) oder höher

Systemanforderungen für macOS

	Mac
Prozessor	M1 mit 8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine
RAM	16 GB oder höher
OS	Monterey 12

Systemanforderungen für den Web-Dienst

Empfohlen für Browser

	Browsers
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
iOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimum für mobile Geräte

Typ	Android	iOS
Gerät	Galaxy S7 gleichwertig oder höher	iPhone 7 gleichwertig oder höher
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11,0
RAM	3 GB oder höher	2 GB oder höher
AP	Über Snapdragon 710	A10 Fusion


Installation unter Windows

Medit Link wird als Paket mit den Scan-Erfassungsprogrammen Medit Scan for Clinics und Medit Scan for Labs installiert.


1. Führen Sie Medit_LinkSetup.exe aus.
2. Wählen Sie eine Sprache für die Installation.
3. Wählen Sie den Ordner für die Installation von Medit Link. Bitte lesen und akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen und klicken Sie auf „INSTALLIEREN“.

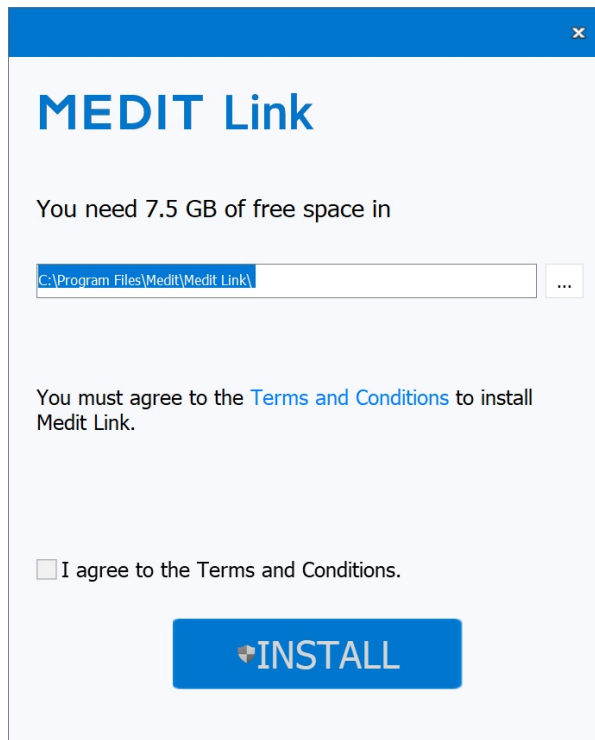

4. Stellen Sie sicher, dass das Scannerkabel vom Computer getrennt ist, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Die Installation kann nicht fortfahren, wenn der Scanner an Ihren PC angeschlossen ist.
5. Das Programm wird automatisch installiert und kann ein paar Minuten dauern. Schalten Sie den PC nicht aus und ziehen Sie nicht den Netzstecker, bevor die Installation abgeschlossen ist.

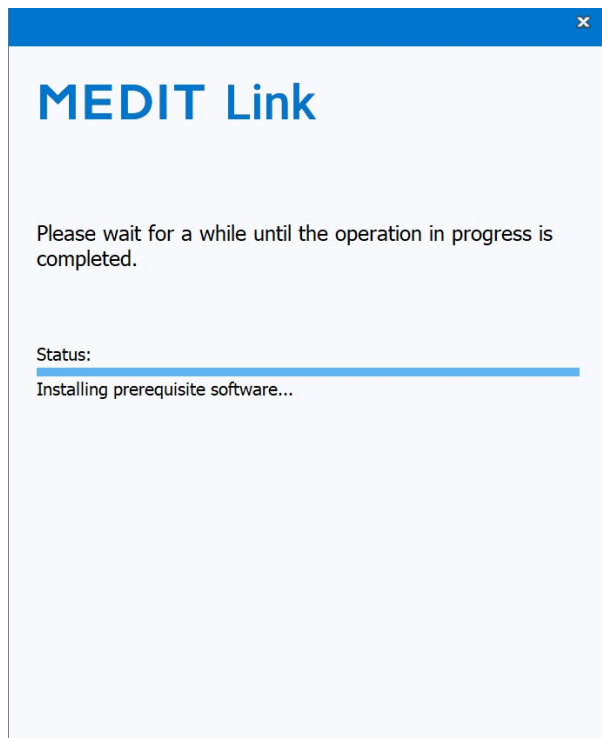

6. Bitte starten Sie Ihren PC neu, nachdem die Installation abgeschlossen ist. Sie können ohne Neustart des PCs fortfahren, wenn Sie den Scanner nicht haben.

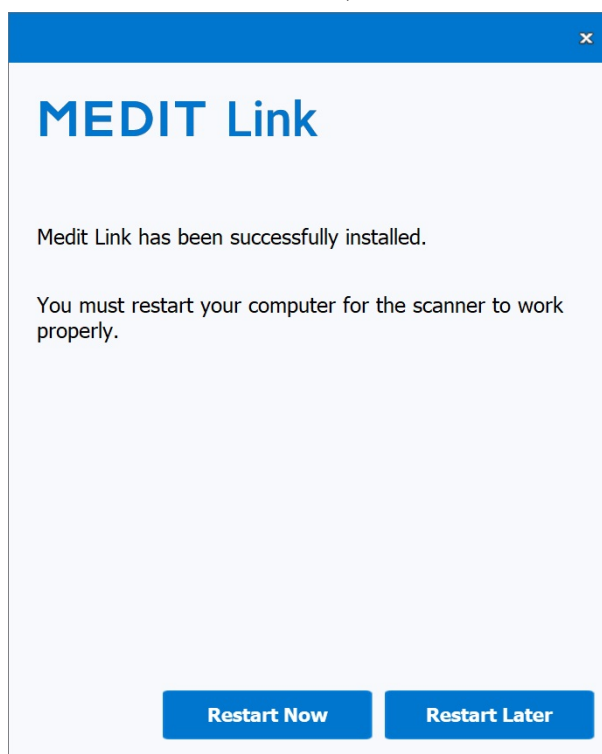


iHinweis

Wenn Sie Ihren PC nicht neu starten, nachdem die Installation abgeschlossen ist, funktioniert der Scanner möglicherweise nicht richtig.


Installation unter macOS

Medit Link wird als Paket mit Medit Scan for Clinics installiert.

1. Führen Sie Medit_Link_x.x.x.pkg aus und klicken Sie auf „Fortfahren“.

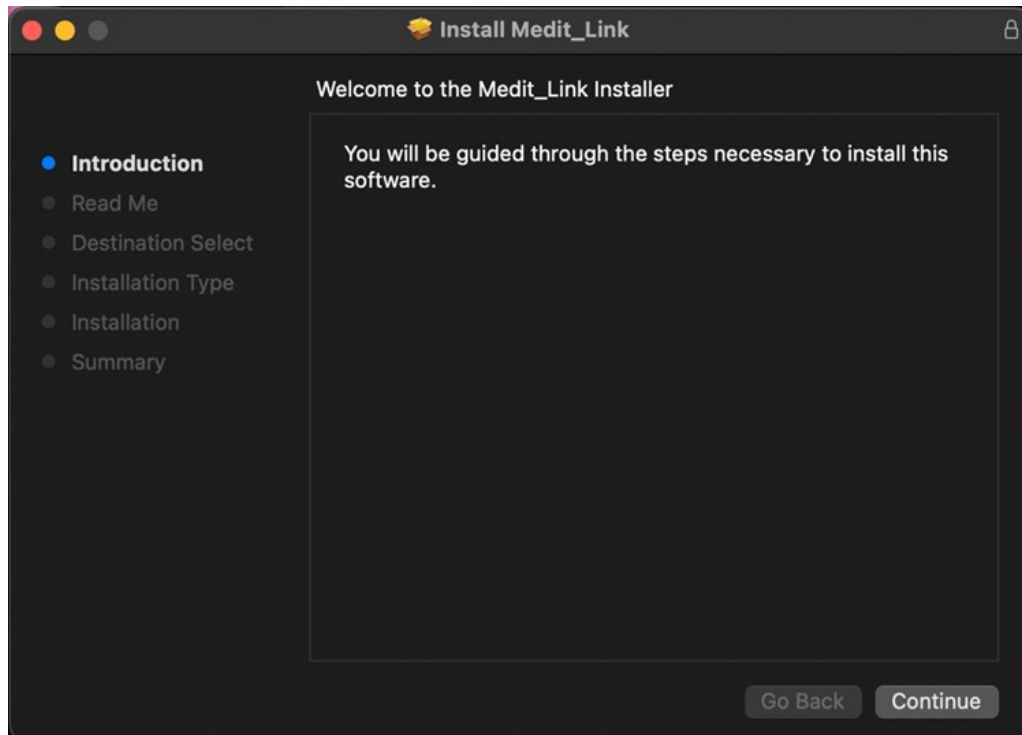


2. Lesen Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf „Fortfahren“.

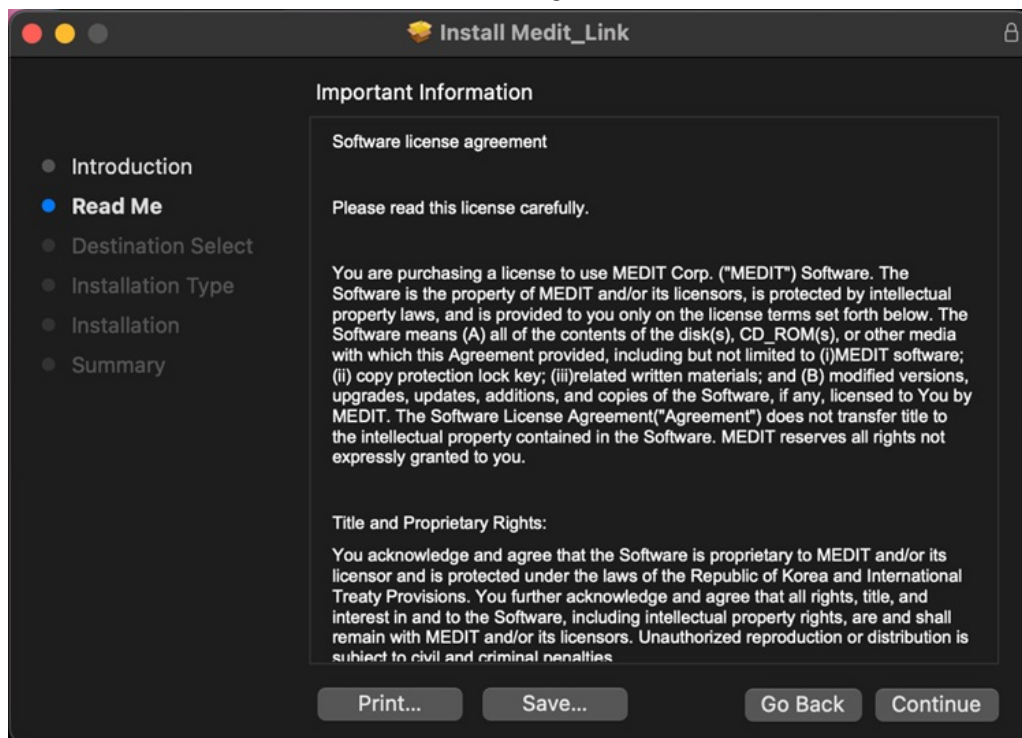


3. Wählen Sie den zu installierenden Datenträger und klicken Sie auf „Fortfahren“.



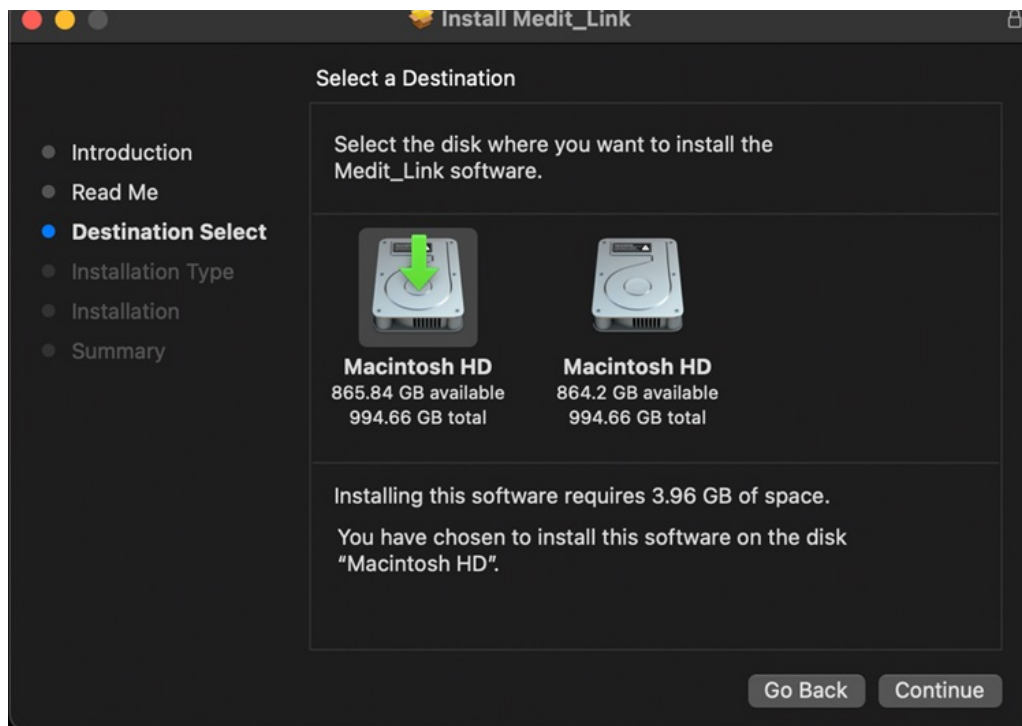


4. Klicken Sie auf „Installationsort ändern...“, um das Installationsziel zu ändern.

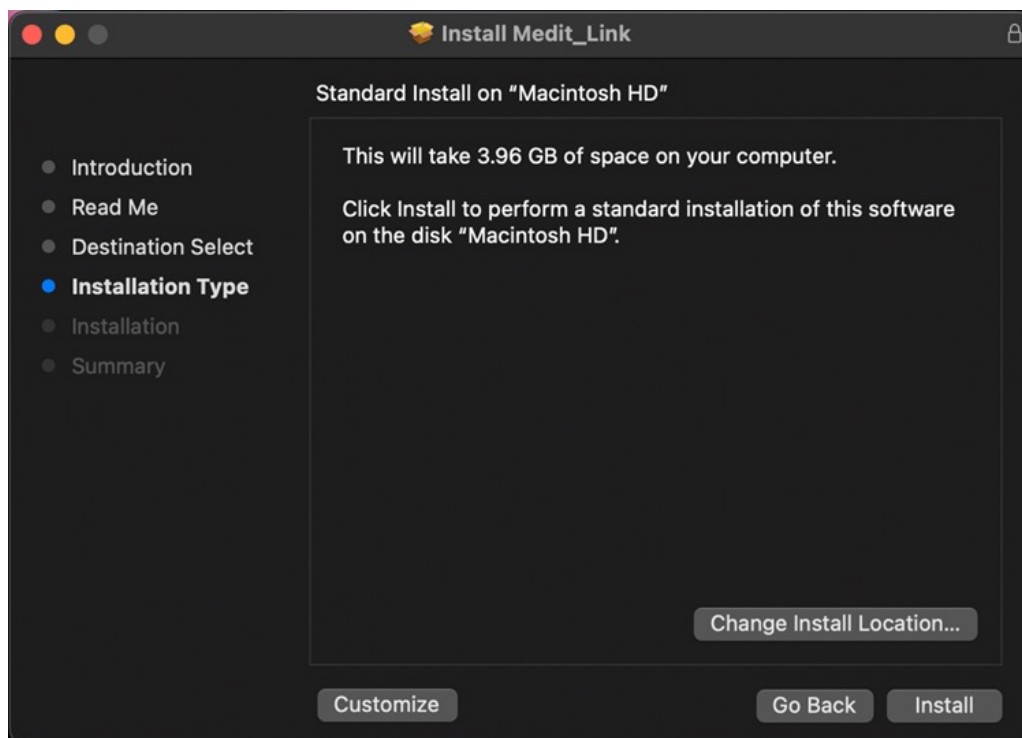


5. Klicken Sie auf „Installieren“ und geben Sie Ihr Mac-Passwort ein, um die Installation zuzulassen, falls Sie dazu aufgefordert werden.



6. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.

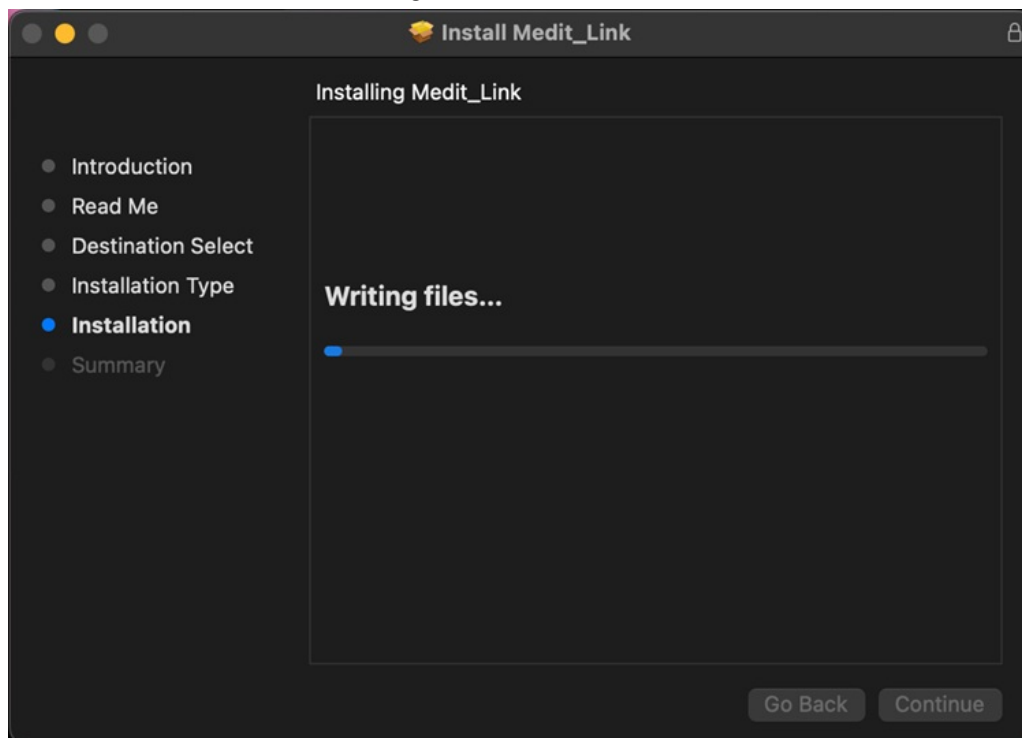


7. Klicken Sie auf „Schließen“, um das Installationsfenster zu verlassen.

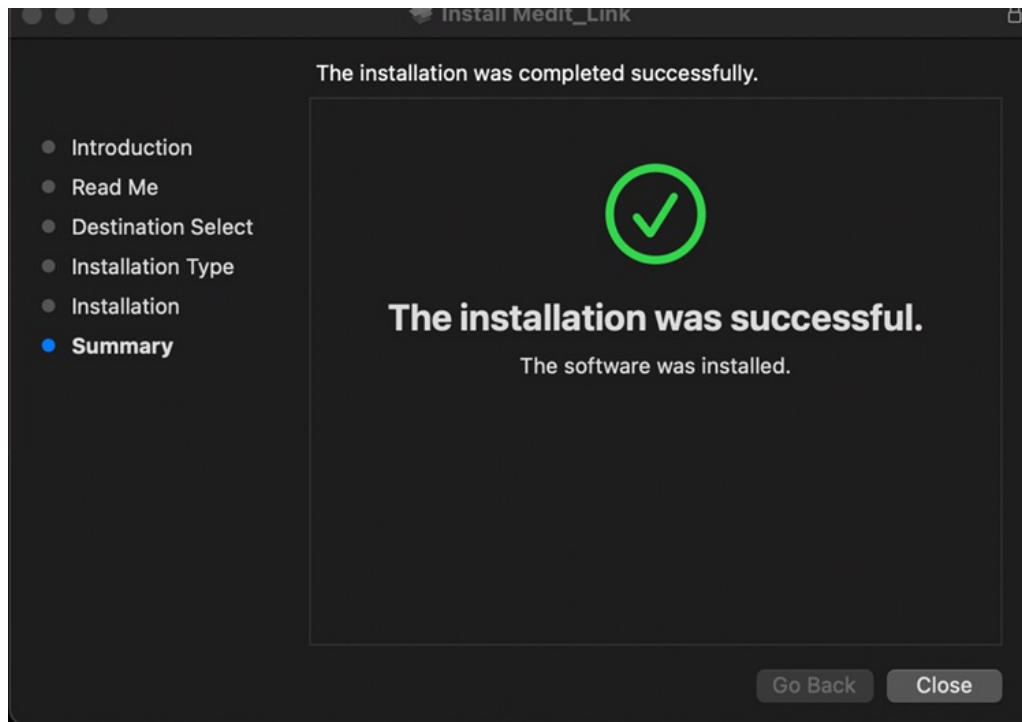

Registrieren & Anmelden

Medit Link Website

Registrieren Sie sich für den Dienst Medit Link unter www.meditlink.com.

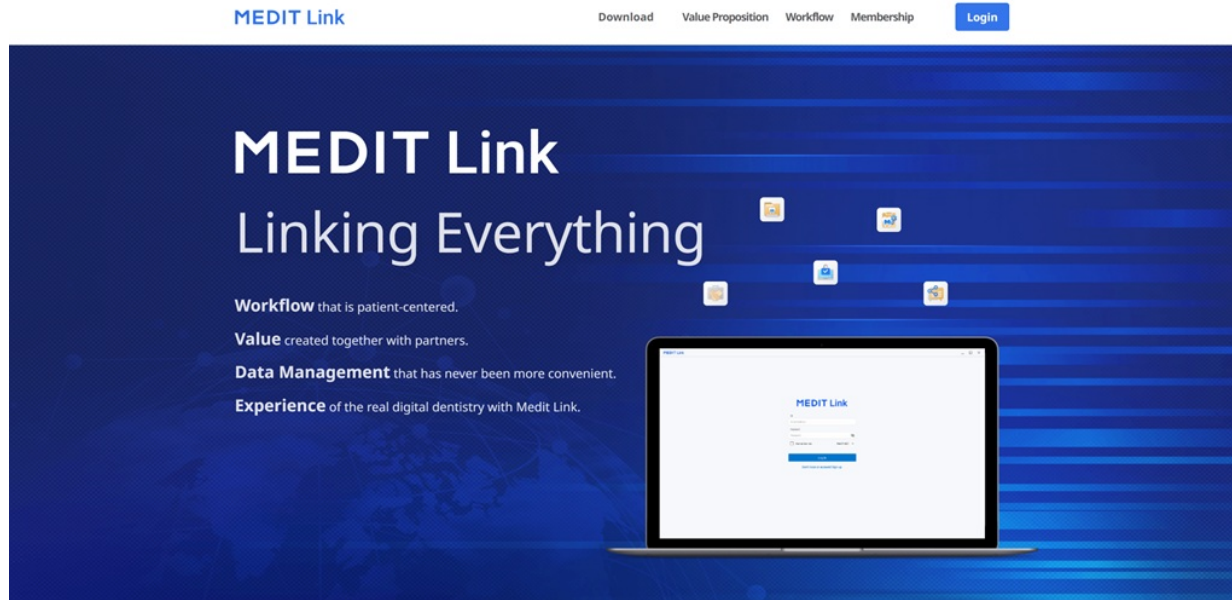

iHinweis

Melden Sie sich für Medit Link China unter www.meditlink.cn an.

Registrieren

Um den Dienst Medit Link zu benutzen, müssen Sie sich für ein Konto registrieren. Sie können die Funktionen von Medit Link benutzen, nachdem Sie ein Konto als Praxis oder Labor eingerichtet haben.

Benutzer können einen der folgenden vier Konto-Typen auswählen, um sich für eine Mitgliedschaft zu anmelden und den Dienst mit vollen oder eingeschränkten Funktionen und Privilegien zu benutzen, je nach Konto-Typ.

- Praxis - Verwalter
- Praxis - Mitglied
- Labor - Verwalter
- Labor - Mitglied

Der Verwalter ist in der Regel ein Vertreter Ihrer Organisation und hat vollen Zugriff auf alle Funktionen und Dienste von Medit Link. Im Gegensatz dazu hat das Mitgliedskonto einen eingeschränkten Zugang.

Um eine Mitgliedschaft zu registrieren, folgen Sie diesen Schritten:

1. Klicken Sie auf „Sie haben noch kein Konto?“ „Registrieren“ auf der Anmeldungsseite.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. Need help? ▾

Log In

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) ▾

- Nachdem Sie die bereitgestellten Beschreibungen gelesen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“ für den gewünschten Konto-Typ.



Clinic



Lab

Administrator

Dentist (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order/Payment
- ✓ Member Management

Register

Administrator

Representative/Leader (Manager)

All Medit Link functions are available.

- ✓ Price Management for Dental Prostheses
- ✓ Order Management
- ✓ Member Management

Register

Member

Dental Hygienist and Dental Staff

In order to use Medit Link, join your group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Oral Scanning

Register

Member

Laboratory Employees

In order to use Medit Link, join your lab's group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.


- ✓ Receiving Data for Making Dental Prostheses
- ✓ Sharing work files and production processes.

Register

- Geben Sie den Praxis- oder Laborname ein und gehen Sie dann je nach gewünschtem Konto-Typ wie im Folgenden beschrieben vor:
 - Wenn Sie sich als Verwalter anmelden, klicken Sie auf „Verfügbarkeit prüfen“, um zu sehen, ob der eingegebene Name verfügbar ist.
 - Wenn Sie sich als Mitglied anmelden, klicken Sie auf „Suche“. Der Verwalter muss Ihre Organisation bereits registriert haben, bevor Sie sich anmelden.
- Füllen Sie den Rest des Registrierungsformulars aus und klicken Sie auf „Anmelden“. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail.
- Um den Registrierungsprozess abzuschließen, Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse über den erhaltenen Link.

Anmeldung und Willkommensseite

1. Geben Sie auf der Anmeldeseite Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Einloggen“.

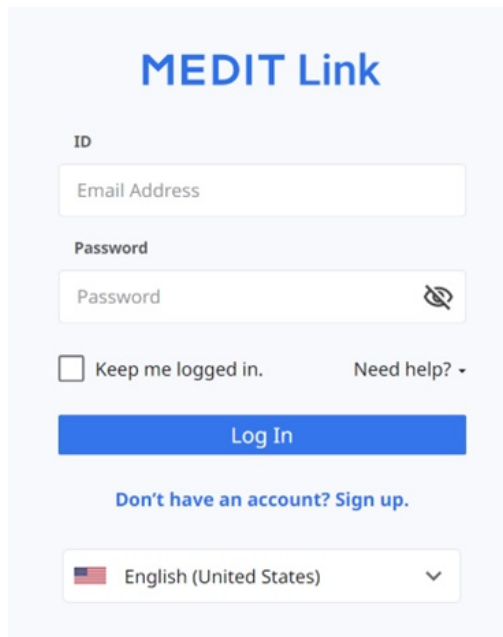


The login form for MEDIT Link features a light blue header with the logo. Below it, there are two input fields: 'ID' (labeled 'Email Address') and 'Password' (with a toggle icon). A checkbox for 'Keep me logged in.' and a 'Need help?' link are positioned below the password field. A prominent blue 'Log In' button is centered. Below the button, a link reads 'Don't have an account? Sign up.' At the bottom, a language selector shows 'English (United States)' with a dropdown arrow.

2. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt, wenn Sie die Informationen zur Organisation nicht ausgefüllt haben.

Hinweis

Um die Dienste von Medit Link zu benutzen, sollten Sie die Informationen zu Ihrer Organisation über das Verwalter-Konto eingeben.

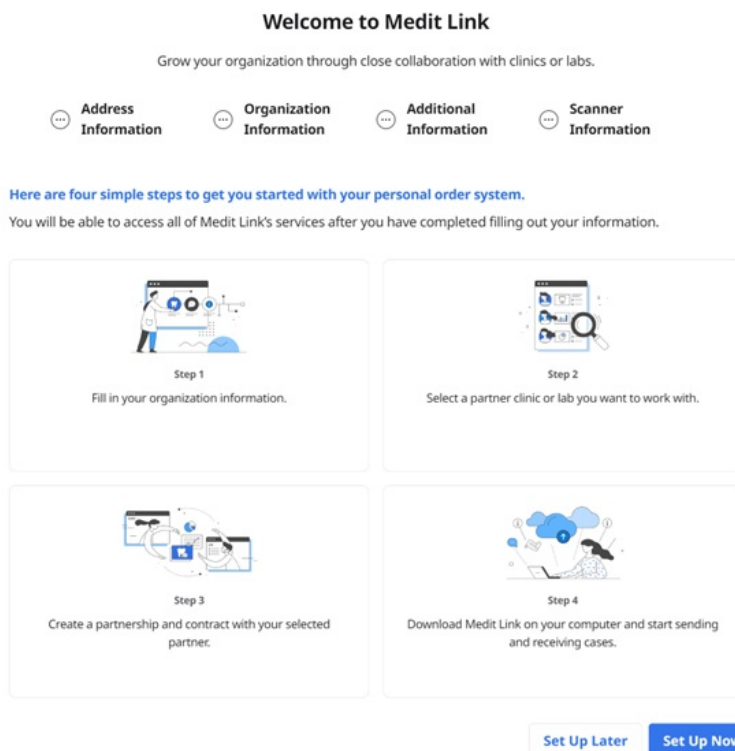

The 'Welcome to Medit Link' page provides a setup guide. It begins with the heading 'Welcome to Medit Link' and the subtext 'Grow your organization through close collaboration with clinics or labs.' Below this, four steps are listed with icons: 'Address Information', 'Organization Information', 'Additional Information', and 'Scanner Information'. A blue link states: 'Here are four simple steps to get you started with your personal order system.' Below this, a paragraph reads: 'You will be able to access all of Medit Link's services after you have completed filling out your information.' The steps are detailed in a grid:

- Step 1:** Fill in your organization information.
- Step 2:** Select a partner clinic or lab you want to work with.
- Step 3:** Create a partnership and contract with your selected partner.
- Step 4:** Download Medit Link on your computer and start sending and receiving cases.

At the bottom, there are two buttons: 'Set Up Later' and 'Set Up Now'.

3. Klicken Sie auf „Jetzt einrichten“ und geben Sie Schritt für Schritt die Informationen zur Adresse, Informationen zur Organisation, Zusätzliche Informationen und Scannerinformationen ein.

Wenn Sie bei der Registrierung dem Erhalt von Marketinginformationen zugestimmt haben, erhalten Sie nützliche Informationen über das Produkt und den Dienst des Herstellers.

4. Die auf der Willkommenseite eingegebenen Informationen können jederzeit unter Meine Informationen > Meine Organisation in Medit Link Web bearbeitet werden.

Übersicht

MEDIT Link

Case Box

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total Cases : 18

2023-01-06 ~ 2023-04-06

Case Name

Case Name / Contains


Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name	
Scan Completed	mandibular movement - Clone ~...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	COL-20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order-test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-	Share

< 1 2 >

Dashboard

Dashboard Übersicht

Sie können die Gesamtstatistik für die gesamte auf Medit Link geleistete Arbeit in visualisierten Grafiken und Diagrammen anzeigen - beide in der Medit Link App als auch im Web.

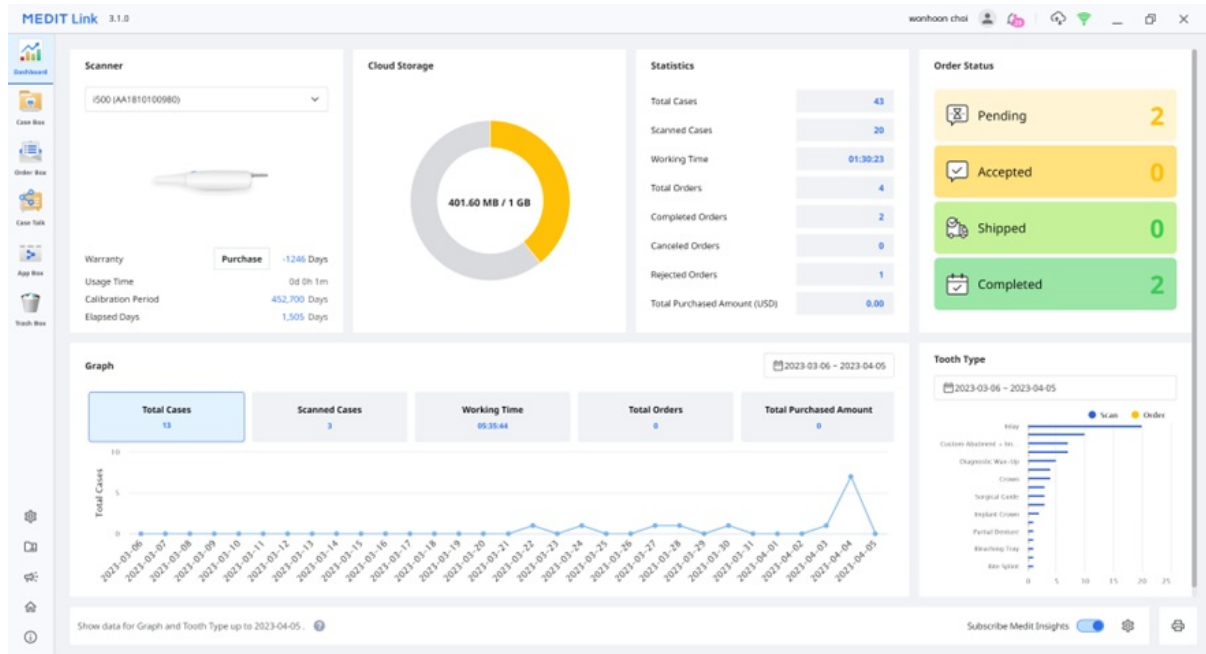

Grafiken und Diagramme im Dashboard zeigen Gesamtstatistik für die gesamte Arbeit in Medit Link an.

Scanner	Geben Sie Informationen zu den aktiven Scannern an, einschließlich Garantie, Scanner-Benutzungszeit, Kalibrierungsintervall und verstrichene Kalibrierungszeit.
Cloud-Speicher	Zeigen Sie die Gesamtkapazität der Cloud und die benutzte Menge an.
Gesamtstatistik	Bieten Sie Gesamtstatistik zu Fällen basierend auf dem Auftragsstatus an.
Bestellstatus	Bieten Sie Gesamtstatistik zu Fällen basierend auf dem Bestellstatus an.
Diagramm	Diagramm Auftragsinformationen nach Zeitraum.
Zahntyp	Bieten Sie Gesamtstatistik über die Anzahl der Scans und Bestellungen nach Behandlungsinformationen an.


Medit Insights

Medit Insights ist ein Dienst, der Ihnen hilft, Ihre Nutzungsstatistiken zu analysieren.

iHinweis

Der folgende Dienst ist auf Medit Link China nicht verfügbar.

- Medit Insights

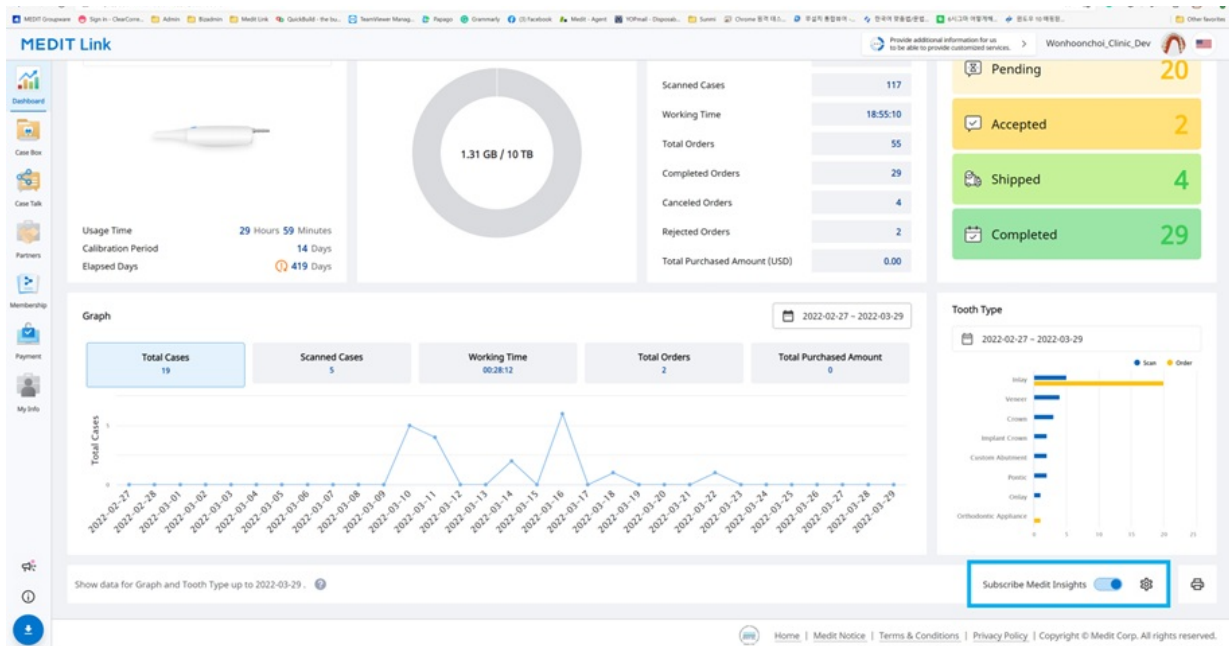

Medit Insights abonnieren

Sie können am zweiten Tag eines jeden Monats einen Bericht per E-Mail erhalten. Es ist keine zusätzliche Anmeldung erforderlich. Aktivieren Sie einfach „Medit Insights abonnieren“.

Wenn Sie nicht die E-Mail-Adresse benutzen, die Sie für Ihr Medit Link-Konto verwendet haben, können Sie eine andere E-Mail-Adresse für den Empfang von Medit Insights festlegen.

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account
 ☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel
OK

Am zweiten eines jeden Monats erhalten Sie eine E-Mail mit den unten aufgeführten Gesamtstatistik.

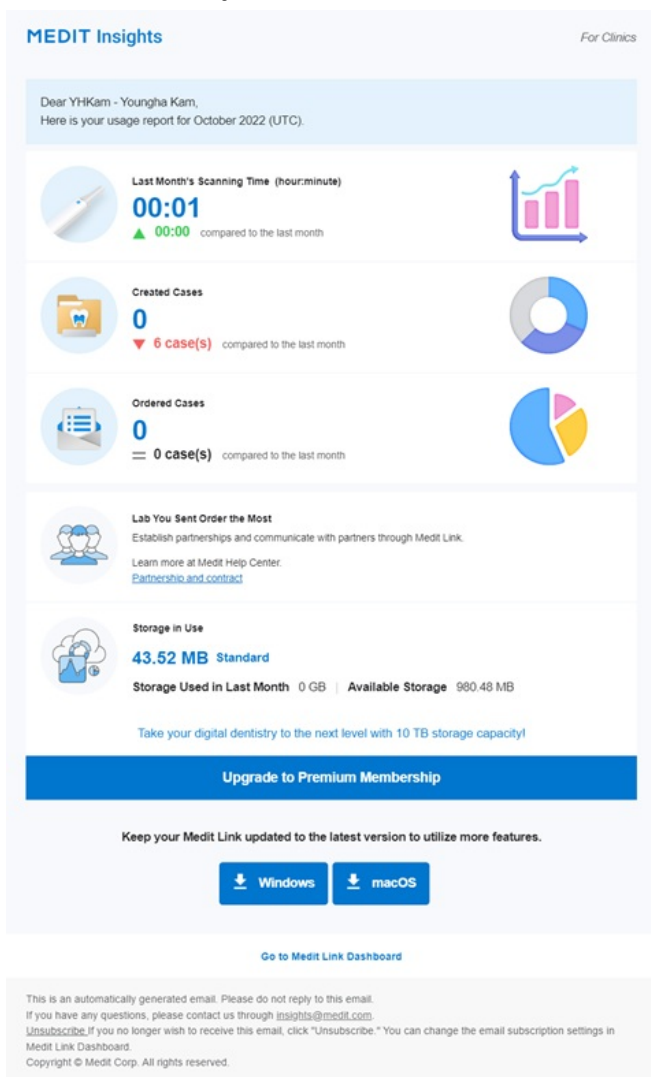


Banner	Medit stellt hier nützliche Tipps und Informationen zur Verfügung. * Wenn Sie das Banner nicht sehen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Marketing- und Werbevereinbarung unter Meine Informationen > Mein Konto.
Statistische Informationen	Es werden Gesamtstatistik Informationen angezeigt, wie z.B. Scanzeit, erstellte Fälle, meistbestelltes Labor, usw.
Medit Link Herunterladen	Die Schaltfläche enthält den Herunterladen-Link für den Medit Link.
Dashboard	Alle statistischen Informationen basieren auf Ihren Dashboard-Informationen. Mehr Einzelheiten können Sie im Dashboard einsehen.

Medit Insights abmelden

Deaktivieren Sie „Medit Insights abonnieren“ im Dashboard oder klicken Sie in der erhaltenen E-Mail auf „Abmelden“.

Case Box/Work Box


In der Case Box (Praxis) oder Work Box (Labor) werden alle Fälle angezeigt, die der Benutzer in der Anwendung Medit Link erstellt hat. Sie können die Dateien über einen Web-Browser einsehen, ohne ein separates Programm zu installieren.

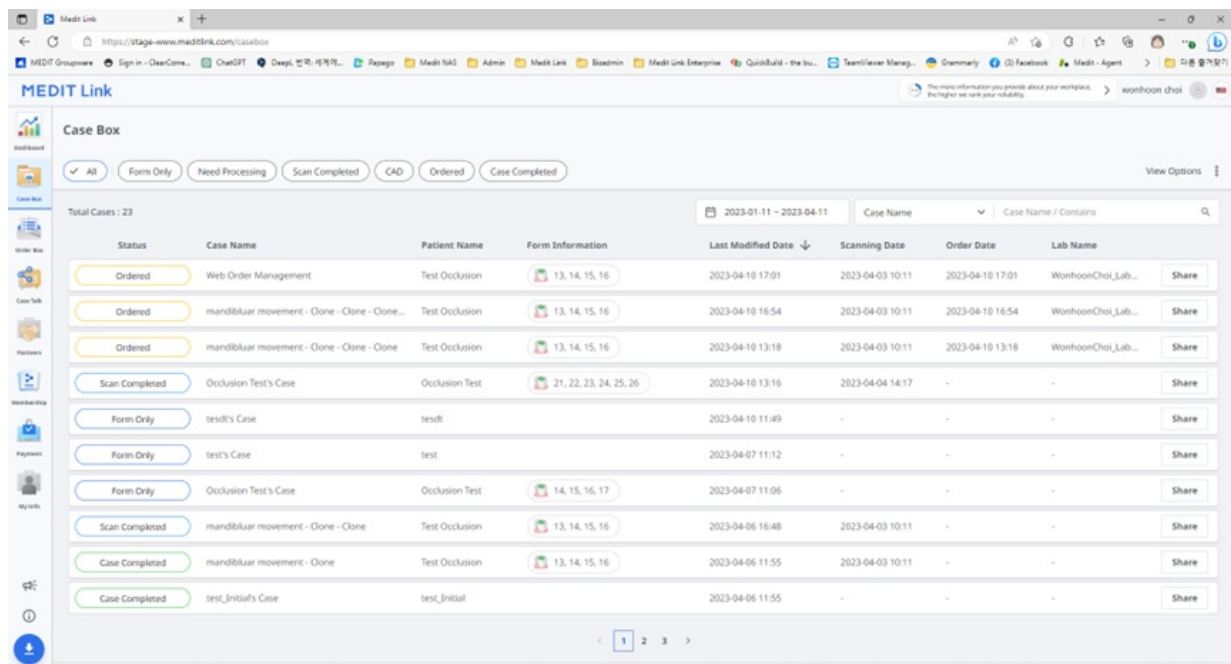

Fall-Filterung

Filtern nach Status

Sie können Fälle nach ihrem Status filtern.

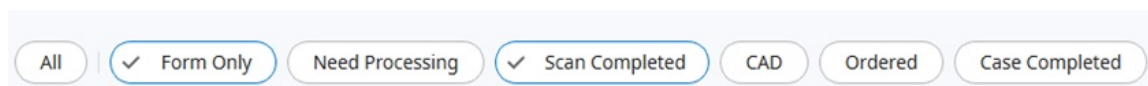

- Der Benutzer kann auf den Status klicken, den er sehen möchte. Der Browser zeigt nur Fälle mit dem gewählten Status an.
- Der Benutzer kann mehrere Status auf einmal auswählen.

Der folgende Status-Typ wird je nach Konto-Typ angeboten:

Case Box (Praxis)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Labor)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Filtern nach Dauer

Sie können Fälle filtern und anzeigen, die innerhalb des von Ihnen festgelegten Zeitraums zuletzt bearbeitet wurden.

1. Klicken Sie auf den Zeitraumfilter.



2. Wählen Sie den Bereich.



- Alle: Zeigt alle Fälle an.
- Benutzerdefinierter Bereich: Geben Sie das Beginnen- und Enddatum an, um die Fälle anzuzeigen, die innerhalb dieses Zeitraums zuletzt bearbeitet wurden.
- Heute: Zeigt Fälle an, die heute zuletzt bearbeitet wurden.
- Gestern: Zeigt Fälle an, die mit dem Datum von gestern zuletzt bearbeitet wurden.
- Letzten 7 Tage: Zeigt die Fälle an, die in den letzten 7 Tagen (außer heute) zuletzt bearbeitet wurden.
- Letzten 30 Tage: Zeigt die Fälle an, die in den letzten 30 Tagen (außer heute) zuletzt bearbeitet wurden.
- Letzten 90 Tage: Zeigt die Fälle an, die in den letzten 90 Tagen (außer heute) zuletzt bearbeitet wurden.
- Diesen Monat: Zeigt die Fälle dieses Monats an.
- Vorherige Monat: Zeigt die Fälle vorherige Monats an.

Die Fall-Liste wird in Echtzeit mit den Fällen aktualisiert, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums erstellt oder zuletzt bearbeitet wurden.


Filtern nach Suche

Sie können die Suchfunktionen nutzen, um einfach und schnell nach den gewünschten Informationen zu suchen.

Suchoptionen basierend auf dem Praxis/Labor-Konto:

Case Box (Praxis)	Fallname, Patientenname, Patienten-ID, Laborname
Work Box (Labor)	Fallname, Patientenname, Praxisname, Bestell-ID

Fall Einzelheiten

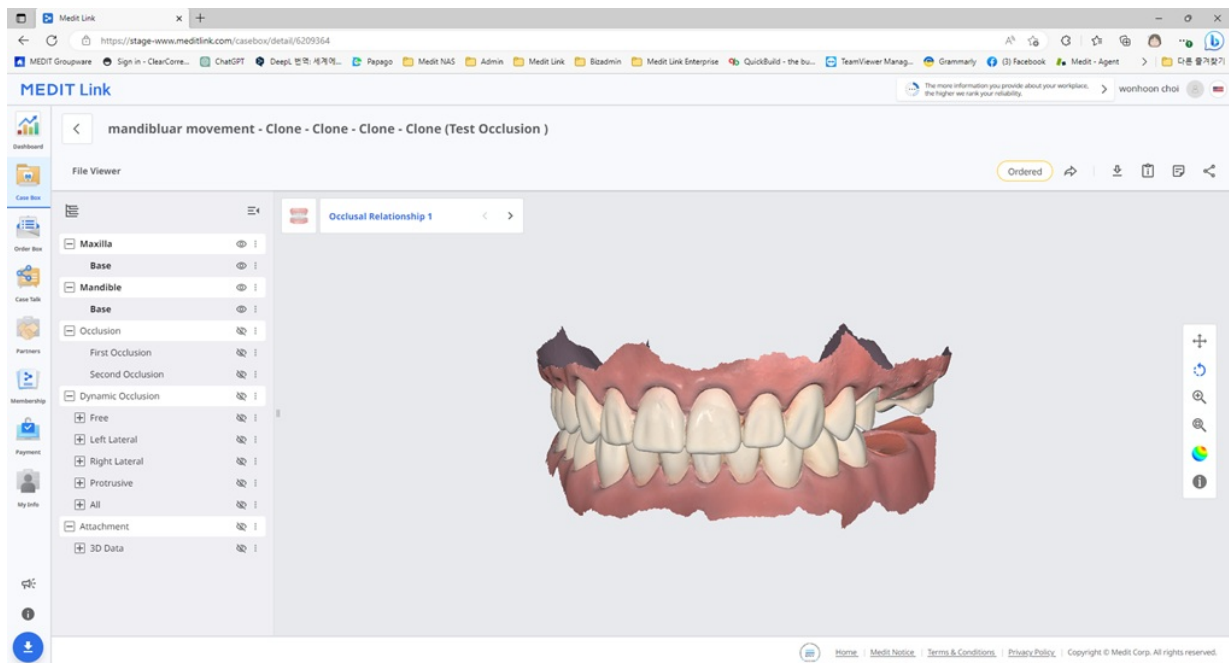

Die folgenden Fallverwaltungs-Werkzeuge sind in Case Box/Work Box enthalten.

	Fallstatus	Zeigen Sie die Status für den Fall an.
	Gehe zu Einzelheiten	Bietet eine Verknüpfung für denselben Fall in einer anderen Box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Herunterladen	Herunterladen von Dateien im Fall auf den lokalen PC.
	Fallinformationen	Überprüfen Sie die Fall Einzelheiten und speichern Sie sie als PDF oder drucken Sie sie aus.
	Notiz & Tags	Fügen Sie eine Notiz oder Tags hinzu, wenn Sie einen Fall anmelden oder bestellen. Benutzen Sie diese, um Ihren Partner zusätzliche oder ergänzende Informationen über den Fall mitzuteilen.
	Teilen	Erstellen Sie einen Link zum Teilen. Benutzer mit dem geteilten Link können auf die 3D-Daten in einem Browser wie Chrome, Firefox oder Safari zugreifen, ohne zusätzliche Programme zu installieren.

Order Box/In Box

Die Order Box (Praxis) oder In Box (Labor) zeigt bestellte Fälle in der Medit Link-Anwendung an.

Bestelleinheiten

The screenshot shows the Medit Link application interface. The top bar includes a search field with 'test (test)' and a user profile 'worhooon choi'. The sidebar on the left contains navigation icons for Dashboard, Case Box, Order Box, Case Tab, Partners, Membership, Payment, and My Info. The main content area is divided into two panels. The left panel (Order Box) contains form fields for Order ID (5995726), Patient Name (test), Partner Name (WorhooonChoi_Lab_Stage), Scanning Date (2023-04-05), Order Date (2023-03-28 AM 08:34), Requested Delivery Date (PM 12:00), and Expected Delivery Date (2023-04-05 PM 12:00). The right panel (Order List) displays a table of orders with columns for No., Type, Method, Material, Shade, and Price. The status 'Pending' is shown in a yellow box.

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
14	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None	0.00
15	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None	0.00
16	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None	0.00
23	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None	0.00
24	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None	0.00
25	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None	0.00
26	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None	0.00
27	Inlay	-	Multi-Layered Zi...	None	0.00
28	Onlay	-	Glass Ceramic	A3.5	0.00

Total USD 0.00

- 1 Zeigen Sie den Fallname und den Patientennamen an.
- 2 Bereitstellung von Funktionen für die Bestellverwaltung (Akzeptieren/Abgebrochen; Liefern/Empfangen).
- 3 Verfügbare Tabs anzeigen: Bestellung, Datei-Viewer
- 4 Zeigt Funktionen zur Verwaltung von Fällen und Dateien an: Fallstatus, Verknüpfungen für detaillierte Informationen, Fallinformationen, Notiz & Tags usw.
- 5 Zeigen Sie die detaillierte Information für die Bestellung an, einschließlich der Bestellnummer, Patientennamen, Partnername, Scandatum, Bestelldatum, Lieferdatum und Notiz & Tags.
- 6 Zeigen Sie die Informationen zum bestellten Produkt und den Lieferstatus an.


Tabs in Order Box/In Box

Bestellung	Datei-Viewer
Überprüfen Sie die detaillierte Informationen für die Bestellung, wie z.B. Bestell-ID, Patientennamen, Kontoname, Scandatum, Bestelldatum, Lieferdatum, Notiz und Tags.	Betrachten Sie die durch Scan-/CAD-Vorgänge erzeugten Dateien. Der Datei-Viewer zeigt und verwaltet die erfassten oder angehängten 3D-Modelle und 2D-Bilder.

Case Talk

In Medit Link erstellte Fälle können mit bestimmten Personen, die Sie angeben, mit jedem, der den geteilten Link hat, oder mit registriert Mitgliedern von Medit Link geteilt werden.

Der Benutzer kann eine Liste aller geteilten Fälle über „Case Talk“ in der Medit Link App und Medit Link Web sehen.

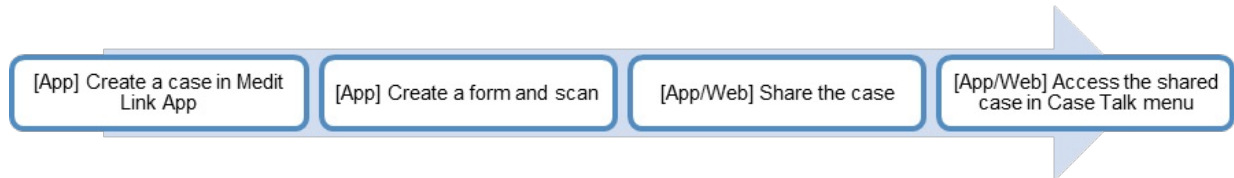

Geteilte Fälle können über einen Webbrowser angezeigt werden, ohne dass ein separates Programm installiert werden muss, was eine einfache Kommunikation über die 3D-Daten auf verschiedenen Geräten ermöglicht.

Erstellen eines Case Talk

Sie können einen geteilten Link zu einem Fall erstellen, der in Case Box/Work Box erstellt wurde.

1. Suchen Sie einen Fall, den Sie teilen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Teilen“ auf der rechten Seite.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name	
Scan Completed	mandibular movement - Clone ...	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 16:48	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	14, 15, 16, 17	2023-04-06 14:40	-	-	-	Share
Ordered	Occlusion Test's Case	Occlusion Test	21, 22, 23, 24, 25, 26	2023-04-06 14:13	2023-04-04 14:17	2023-04-06 14:13	WonhoonChoi_Lab...	Share
Case Completed	mandibular movement - Clone	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	test_initial's Case	test_initial		2023-04-06 11:55	-	-	-	Share
Case Completed	mandibular movement	Test Occlusion	13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:55	2023-04-03 10:11	-	-	Share
Case Completed	COL 20532 test	test	12, 13, 14, 15, 16	2023-04-06 11:53	-	-	-	Share
Case Completed	Order test	test	23, 24, 25, 26, 27	2023-04-05 18:36	-	2023-03-28 16:46	WonhoonChoi_Lab...	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-04-04 13:38	-	-	-	Share
Form Only	test_initial's Case	test_initial		2023-03-31 08:18	-	-	-	Share

2. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie teilen möchten.

Share through Case Talk ?

File List

☒	▼	Maxilla		
☒		Base	meditMesh	3,449KB
☒	▼	Mandible		
☒		Base	meditMesh	2,926KB
☒	▼	Occlusion		
☒		First Occlusion	meditMesh	662KB
☒		Second Occlusion	meditMesh	611KB
☒	▼	Face Scan Data		

6 items selected. 15.23MB/200 MB i

Share With

Share with Anyone ▼

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

[Close](#) [Get Link](#)

3. Stellen Sie die Typ der Freigabeberechtigung und die Freigabeoptionen fest.
4. Klicken Sie auf „Link erhalten“, um einen geteilten Link zu erstellen.

Einstellen des Freigabeberechtigungs-Typ und der Freigabeoptionen

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

1

Create a shared link and share it with specific people.

Share via

+

Expiration Date

2022-06-28

1

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

PIN Code

Enter PIN Code

1

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

✓

Share the patient's name

✓

Grant Download Permission **Premium Feature**

1

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

1

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

✓

Allow comments

1

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close


Get Link

Teilen mit	- Teilen mit Allen Erzeugt einen geteilten Link. Sie können die Dateien mit jedem teilen. - Teilen mit bestimmten Personen Erstellt einen geteilten Link und sendet ihn an bestimmte Personen.
Teilen über	Wenn Sie „Teilen mit bestimmten Personen“ wählen, können Sie den Link mit bestimmten Personen auf verschiedene Weise teilen. - E-Mail-Adresse - SMS - Partner
Verfallsdatum	Legen Sie das Verfallsdatum für den Link fest. Nachdem der Link abgelaufen ist, haben die Personen, für die Sie ihn geteilt haben, keinen Zugriff mehr auf die Dateien. Sie können das Ablaufdatum auf bis zu 90 Tage ab heute verlängern.
PIN-Code	Stellen Sie einen 6-stelligen Zugangscode ein, um die Datensicherheit zu gewährleisten.
Teilen Sie den Namen der Patienten	Wenn Sie diese Option aktivieren, sehen alle Personen, die den Link haben, den Namen des Patienten.
Erlaubnis zum Herunterladen erteilen	Wenn Sie diese Option aktivieren, können alle Benutzer mit dem Link die Dateien herunterladen.
Kommentare zulassen	- Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie über den gemeinsamen Link kommunizieren. - Wenn Sie die Option deaktivieren, kann der Empfänger nur Ihre Kommentare sehen, aber keine eigenen Kommentare hinzufügen.
Kommentar	Sie können eine Nachricht im Kommentarbereich hinterlassen.

29

Case Talk Einzelheiten

Sie können Dateien im geteilten Fall sehen. Die folgenden Funktionen sind auf der Einzelheitenseite von Case Talk verfügbar.

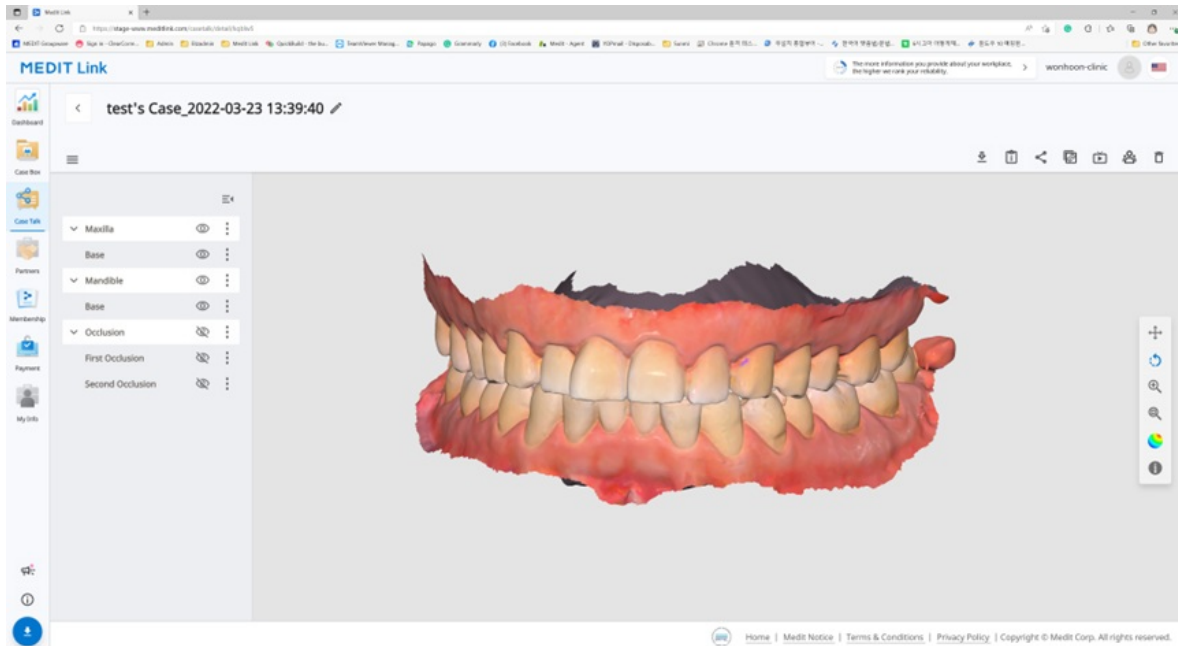

	Herunterladen	Herunterladen Sie in diesem Fall alle Dateien auf Ihren lokalen PC herunter.
	Fallinformationen	Detaillierte Informationen über den Fall anzeigen.
	Teilen	Bearbeiten Sie die Einstellungen teilen.
	Link kopieren	Kopieren Sie den geteilten Link in die Zwischenablage. Der kopierte Link zeigt die Freigegebene Dateien in Ihrem Web Browser an.
	Live	Teilen Sie Ihren Bildschirm mit verbundenen Benutzern. Die Bildschirmfreigabe wird mit allen verbundenen Benutzern synchronisiert.
	Teilnehmer	Zeigen Sie alle Benutzer an, die auf den geteilten Link zugreifen.
	Löschen	Löschen Sie den geteilten Link. Der gelöschte geteilte Link ist nicht mehr zugänglich.

iHinweis

Die folgenden Dienste sind auf Medit Link China nicht verfügbar.


- Live
- Teilnehmer

Web Viewer

Sie können die geteilten Daten in Case Talk in einem Web Browser ansehen.

Sie können mit den Personen, die Zugriff auf den Link haben, über Anmerkungen und Kommentare

kommunizieren.

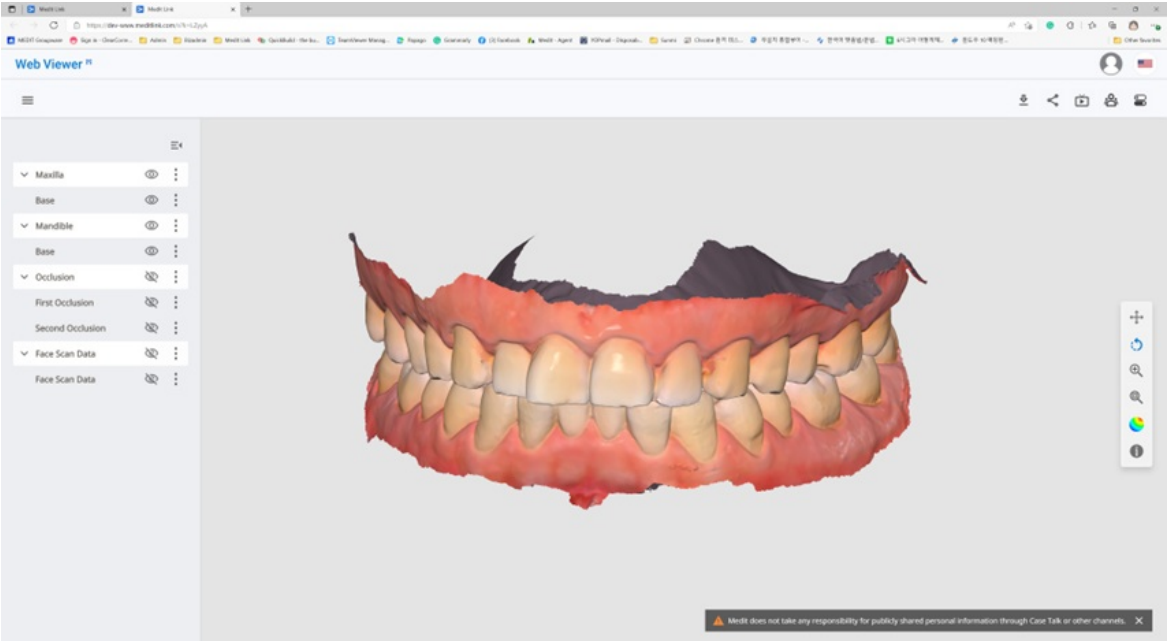

	Herunterladen	Herunterladen Sie in diesem Fall alle Dateien auf Ihren PC herunter.
	Fallinformationen	Detaillierte Informationen über den Fall anzeigen.
	Teilen	Bearbeiten Sie die Einstellungen teilen.
	Live	Teilen Sie Ihren Bildschirm mit verbundenen Benutzern. Die Bildschirmfreigabe wird mit allen verbundenen Benutzern synchronisiert.
	Teilnehmer	Zeigen Sie alle Benutzer an, die auf den geteilten Link zugreifen.
	Zahn-Kennzeichnung	Ändern Sie das System zur Zahn-Kennzeichnung.


Hinweis
Die folgenden Dienste sind auf Medit Link China nicht verfügbar.

- Live
- Teilnehmer

Anmerkung

Sie können Anmerkungen an einer bestimmten Stelle des 3D-Modells hinzufügen. Jeder, der über den

Link verfügt, kann die von Ihnen hinzugefügten Anmerkungen sehen.

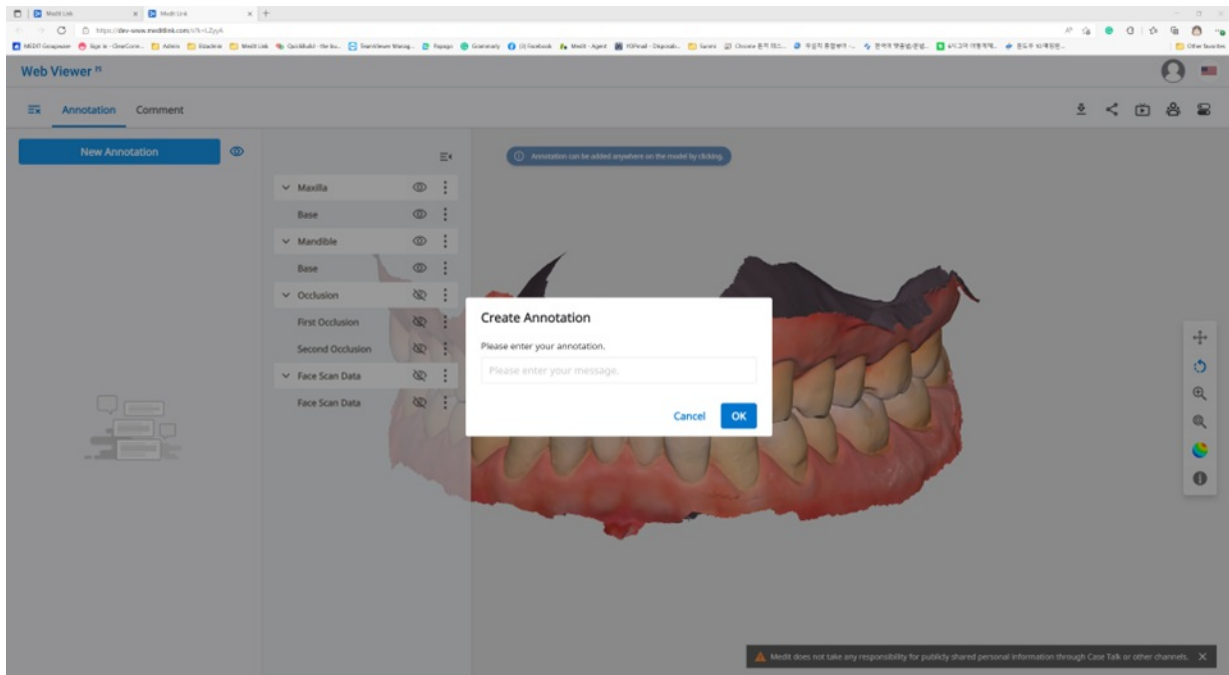

iHinweis

Der folgende Dienst ist auf Medit Link China nicht verfügbar.

- **Anmerkung**

1. Suchen Sie das Menü-Symbol in der oberen linken Ecke und wählen Sie die Tab „Anmerkung“. Benutzen Sie die Schaltfläche „Neue Anmerkung“, um mit einem Klick eine Anmerkung an beliebiger Stelle in den Daten hinzuzufügen.
2. Geben Sie die Nachricht ein und klicken Sie dann auf „OK“, um sie zu speichern.

3. Sie können Anmerkungen als einfachen Kommunikationskanal benutzen. Klicken Sie auf die erstellte Anmerkung, um eine Antwort einzugeben und klicken Sie auf „Senden“.

Kommentare

Sie können mit Benutzern, die Zugriff auf den Link haben, über die Tab „Kommentar“ im Web Viewer-Menü kommunizieren.

iHinweis

Der folgende Dienst ist auf Medit Link China nicht verfügbar.

- [Kommentar](#)

Bildschirmfreigabe in Echtzeit


Sie können Ihren Bildschirm in Echtzeit teilen.

iHinweis

Der folgende Dienst ist auf Medit Link China nicht verfügbar.

- [Live](#)

1. Klicken Sie auf „Live“ um Ihren Web Viewer Bildschirm mit den verbundenen Benutzern zu teilen.

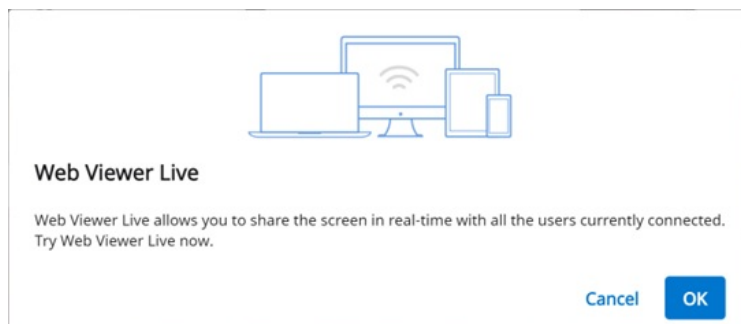

2. Klicken Sie auf „OK“, um die Teilung Ihres Bildschirms zu beginnen.
3. Andere Personen, die auf den Link zugegriffen haben, müssen die Bildschirmfreigabe akzeptieren.
4. Der Bildschirm des Benutzers, der die Bildschirmfreigabe initiiert hat, wird synchron mit dem Bildschirm der Person angezeigt, die die Anfrage erhalten hat.


Datenbaum

Alle Daten werden gruppiert und entsprechend den Attributen im Datenbaum angezeigt. Sie können Daten einblenden oder ausblenden, die Opazität anpassen usw.

Datenbaum Steuerung

Einblenden/Ausblenden	Klicken Sie auf das „Augen“-Symbol, um Daten einblenden oder ausblenden. Steuern Sie die Sichtbarkeit von Daten als Gruppe oder einzelne Datei.
Opazität	Bewegen Sie die Maus über ein sichtbares Element, um den Schieberegler für die Opazität anzuzeigen. Verstellen Sie den Schieberegler, um die Transparenz Ihrer Daten zu ändern.

Datenbaum-Elements. Es enthält die folgenden Optionen:

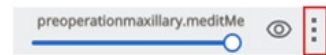


Erweiterte Menü

- Nur Auswahl anzeigen: Blendet alle anderen Daten außer der aktuellen aus.
- Ausblenden: Blendet die aktuellen Daten aus.
- Duplizieren: Daten innerhalb des aktuellen Falls klonen.
- Exportieren: Daten auf einem lokalen PC speichern.
- Löschen: Löschen der aktuellen Daten oder Datengruppe.


3D-Modell-Steuerung

	Schwenken	Verschieben Sie das Modell.
	Rotieren	Rotieren Sie das Modell.
	Vergrößern/Verkleinern	Rein / Raus-zoomen des Modells.
	Zoom anpassen	Platzieren Sie das Modell in der Mitte des Bildschirms.
	Modell- Anzeigemodus	Textur ein
		Textur aus
	Raster- Einstellungen (mm)	Raster ein
		Überlagern ein
		Raster aus


Daten in echten Texturfarben anzeigen.

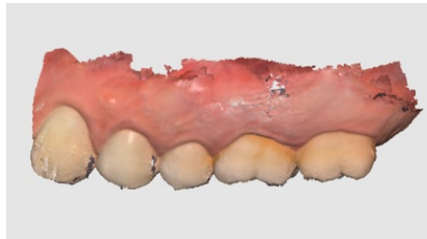


Daten in einer einzigen Farbe anzeigen.

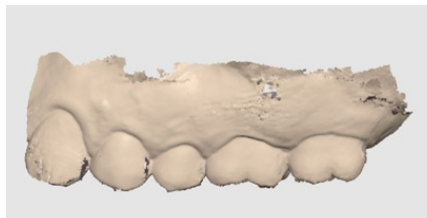

Zeigt das Raster im Hintergrund an.

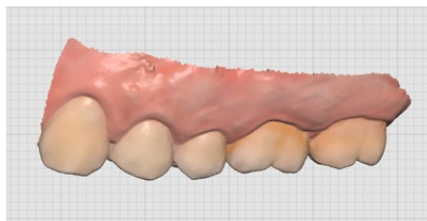

Überlagern Sie das Raster über dem Modell.

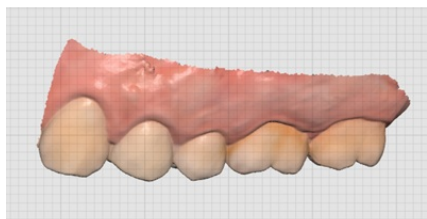

Das Raster ausblenden.

Partner

Sie können nach potenziellen Partnern suchen, um eine Partnerschaft zu beantragen, und die Liste der aktuellen Partner und Partner mit Verträgen einsehen.


Hinweis

Dienste, die Google Maps benutzen, sind auf Medit Link China nicht verfügbar.

Suche nach Partnern

Sie können nach Medit Link-Benutzern anhand ihres Unternehmensnamen und/oder ihrer Adresse suchen.

In den Suchergebnissen können Sie eine Partnerschaftsanfrage an eine Organisation senden, mit der Sie gerne zusammenarbeiten möchten.

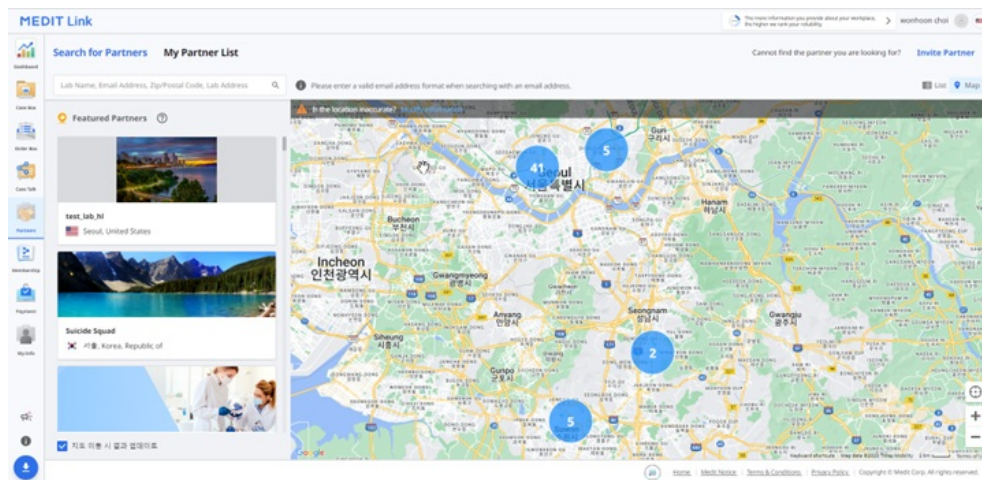


Meine Partnerliste

Unter Meine Partnerliste können Sie Ihre aktuellen Partnerschaften und Verträge mit allen Ihren bestehenden Partner-Unternehmen einsehen.

Was ist der Unterschied zwischen einem Vertrag und einer Partnerschaft?

Sobald Sie eine Partnerschaft mit einem Unternehmen eingegangen sind, können Sie beantragen, einen Vertrag mit dieser Organisation zu stellen.

- Wenn Ihr Partner Ihre Vertragsanfrage akzeptiert, können Sie mit der Zahlung für die erteilten Bestellungen fortfahren.

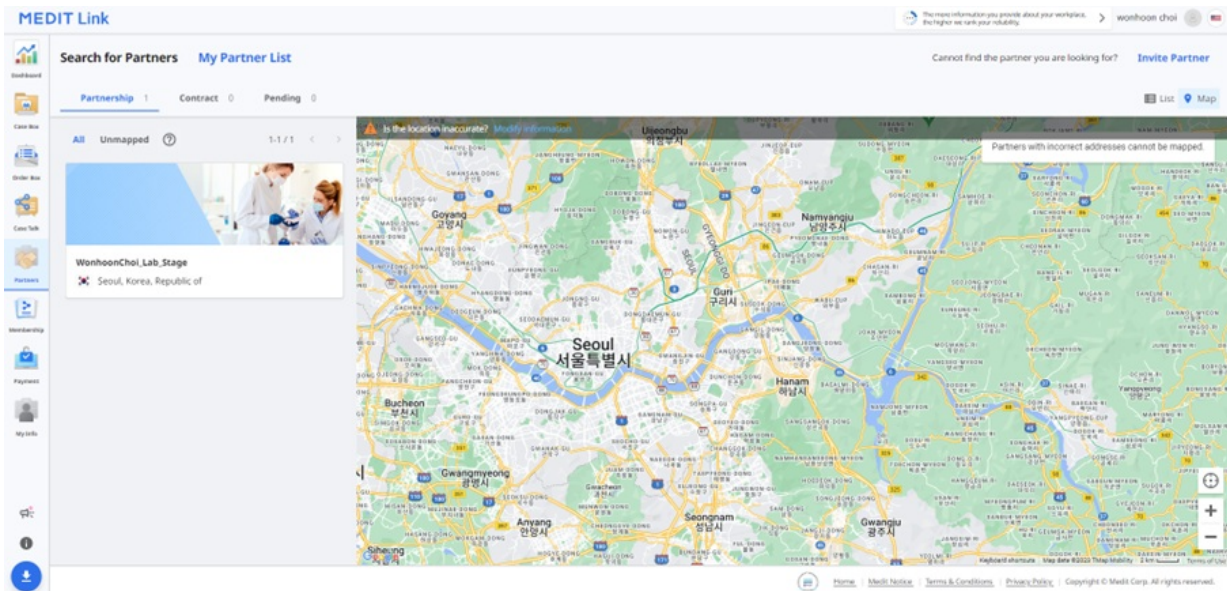

iHinweis

Der folgende Dienst ist auf Medit Link China nicht verfügbar.

- Vertrag

Partner-Einladung

Wenn Sie eine Organisation haben, mit der Sie zusammenarbeiten möchten, können Sie diese einladen, Medit Link beizutreten. Die Partnerschaft wird automatisch geschlossen, sobald die Organisation die Einladung akzeptiert.

1. Klicken Sie auf „Partner einladen“ oben links auf Ihrem Bildschirm.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Anbieters ein, mit dem Sie zusammenarbeiten möchten, und senden Sie ihm eine Einladung mit einer Partnerschaftsanfrage.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel
Send Invitation

3. Sobald die eingeladene Organisation die Einladung akzeptiert und sich bei Medit Link registriert, wird die Partnerschaft automatisch eingerichtet.

Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaftsrichtlinie von Medit Link zielt darauf ab, eine umfassendere digitale Umgebung zu schaffen, die schrittweise erweitert wird, um verschiedene Dienste auf der Grundlage der Cloud-Plattform anzubieten.

Mit unserer neuen Mitgliedschaftsrichtlinie wollen wir unseren Kunden ein einheitlicheres und persönlicheres Erlebnis bieten.

Es sind zwei Mitgliedschafts-Tarife verfügbar:

Standard

- Kostenlose Standard-Tarif für alle angemeldeten Benutzer
- 1 GB Cloud-Speicher
- Für neue Benutzer

Premium

- Bezahlter Tarif
- 10 TB Cloud-Speicher
- Für Benutzer mit vielen Fällen und unterschiedlichen Daten
- Einmonatige kostenlose Testversion

	Standard	Premium
Cloud-Speicher	1 GB	10 TB
Monatliche Gebühr	Kostenfrei	\$0.99/monat
* Cloud-Speicher berechnet nicht den von Rohdaten belegten Speicherplatz.		

Hinweis

Die Mitgliedschaft-Tarife werden auf Medit Link China verfügbar sein. Bis zur offiziellen Freigabe der Funktion können Sie den Premium-Tarif kostenlos nutzen.

Mitgliedschaft

Mein Abonnement

Auf der linken Seite sehen Sie, welchen Mitgliedschafts-Tarif Sie derzeit haben. Hier können Sie auch

jederzeit den Status Ihres Abonnements ändern.

My Plan

Standard

Free

- ✓ Free plan for every member
- ✓ 1 GB of cloud storage
- ✓ Efficient for new users

If you have any difficulties with payment, select "Click" on the right. [Click](#)

Subscribe

Cloud-Speicher

Im Bereich auf der rechten Seite können Sie Ihren Cloud-Speicher verwalten.

Cloud Storage

Set Period

2018-01-01 – 2021-10-07

All

1 Week Ago

1 Month Ago

6 Month Ago

1 Year Ago

☐ Total Selected 0.00 KB

Delete

☐ Raw Data 147.52 GB

Remove raw data.
 Raw data does not take up space in cloud storage.

☐ Result Files & Attachments 13.74 GB

Remove result files and attachments such as mesh, image, or video files.

Zeitraum festlegen

Legen Sie einen bestimmten Zeitraum fest, um Daten zu löschen, die innerhalb dieses Zeitraums erstellt wurden.

- Alle: Alle Dateien anzeigen.
- Vor 1 Woche: Sehen Sie sich die Dateien an, die eine Woche nach der Erstellung vergangen sind.
- Vor 1 Monat: Sehen Sie sich die Dateien an, die einen Monat nach der Erstellung vergangen sind.
- Vor 6 Monaten: Sehen Sie sich die Dateien an, die sechs Monate nach der Erstellung vergangen sind.
- Vor 1 Jahr: Sehen Sie sich die Dateien an, die ein Jahr nach der Erstellung vergangen sind.

Die Rohdaten nehmen keinen Platz im Cloud-Speicher ein und werden daher auch nicht im Di-Diagramm angezeigt. Sie können die Rohdaten jedoch bei


Rohdaten	auch nicht im FI-Diagramm angezeigt. Sie können die Rohdaten jedoch bei Bedarf von hier aus verwalten, z.B. löschen, um die privaten Daten des Patienten zu schützen, usw.
Ergebnis & Anhang	Die Ergebnis- und Anhangsdateien beanspruchen Platz in der Cloud. Wenn die Cloud voll ist, können Sie sich mehr Speicherplatz sichern, indem Sie nicht benötigte Dateien entfernen.
Löschen	Entfernen Sie ausgewählte Dateien aus dem Cloud-Speicher, um den Speicherplatz freizugeben.

Abonnieren


Wenn Sie derzeit den Standard-Plan oder den Premium-Tarif mit einem Einlösecode nutzen, können Sie die Premium-Mitgliedschaft abonnieren.

Die Zahlung wird über den Dienst Stripe (www.stripe.com) abgewickelt.

1. Klicken Sie auf „Abonnieren“.

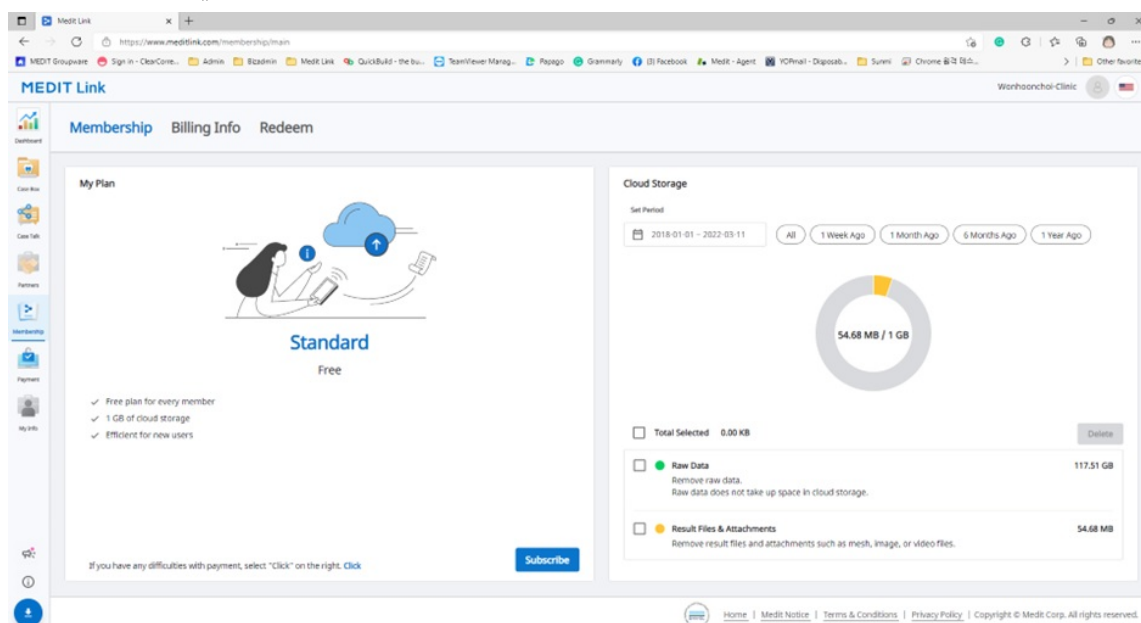

2. Überprüfen Sie die Beschreibung des Premium-Tarif und klicken Sie erneut auf „Abonnieren“.

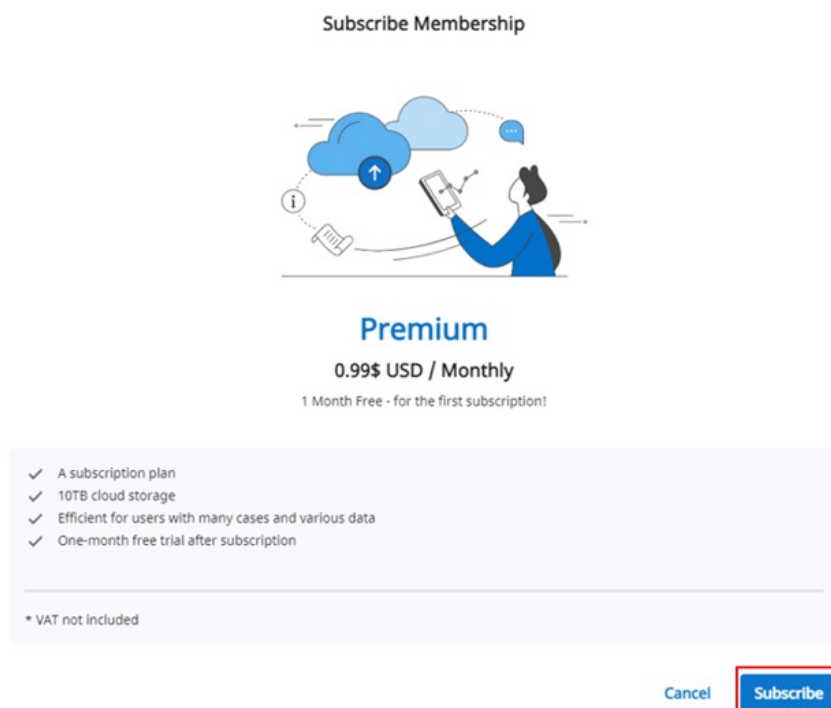

3. Überprüfen Sie den Preis und die Bedingungen und geben Sie die für die Zahlung erforderlichen Informationen ein. Klicken Sie dann auf „Abonnieren“.

erforderlichen Informationen ein. Klicken Sie dann auf „Abonnieren“.

← MEDIT Link TEST MODE

Subscribe to Premium membership for Clinic

\$0.00

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic

Billed daily

\$0.99

Subtotal

\$0.99

1 MONTH FREE – for first subscription

100% off for a day

-\$0.99

Total due today

\$0.00

Powered by stripe | Terms Privacy

Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234

VISA

MM / YYCVC

Name on card

Country or region


South Korea

☐ Save information to pay faster next time

Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.


- Die Zahlung kann einige Sekunden dauern. Wenn Sie fertig sind, sehen Sie die Bestätigungsnachricht.

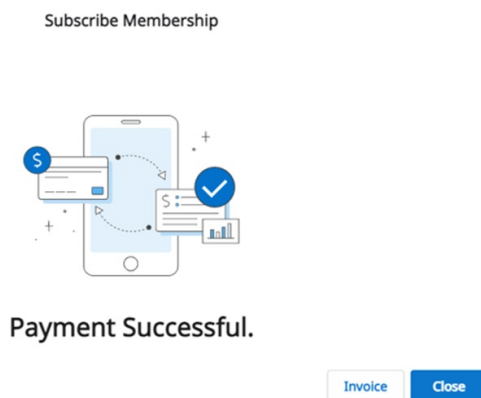


Abmelden

Sie können die Mitgliedschaft jederzeit abbrechen. Nachdem Sie sich abgemeldet haben, können Sie die Premium-Mitgliedschaft für die verbleibenden Tage des bezahlten Monats weiterhin benutzen. Ihr Tarif wird ab dem nächsten Zahlungstag auf Standard umgestellt, und der Cloud-Speicher wird auf 1 GB begrenzt. Wenn die Kapazität des Cloud-Speicher überschritten wird, werden die Dateien nicht gesichert und die Bestellungs- und Teilen-Funktionen sind nicht verfügbar.

- Klicken Sie auf „Abmelden“.

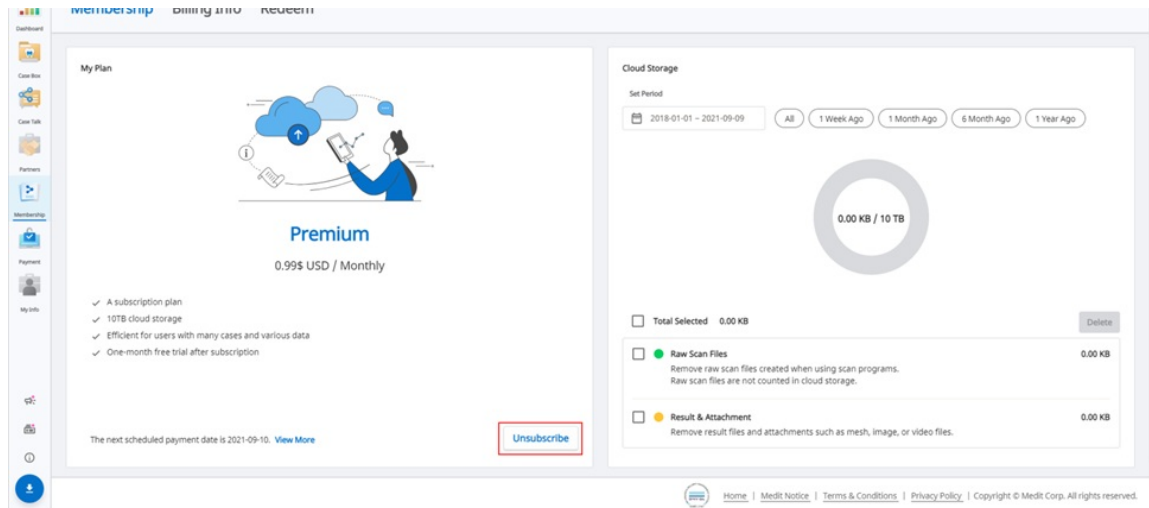

2. Klicken Sie auf „Abonnement kündigen“.

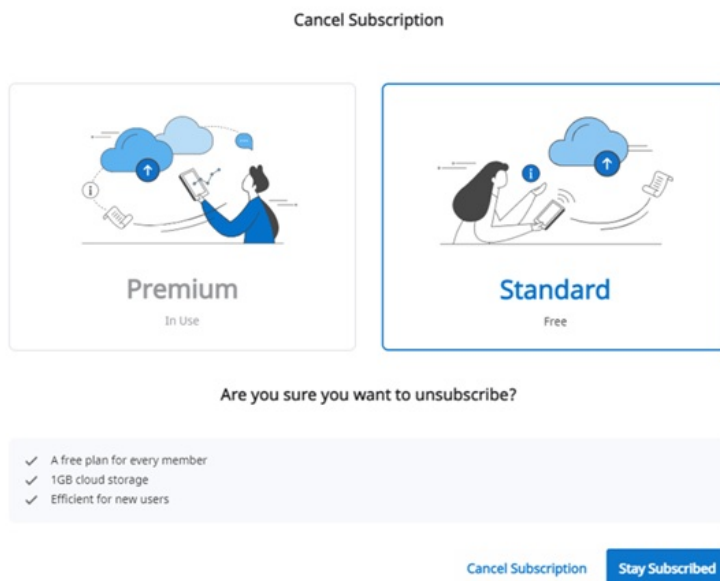


3. Um zu bestätigen, dass Sie das Abonnement abmelden möchten, klicken Sie in dem neuen Pop-up-Fenster erneut auf „Abonnement kündigen“.

Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription Stay Subscribed

4. Ihr Abonnement wurde gekündigt.
5. Ihr Tarif wird ab dem nächsten Zahlungstag auf Standard umgestellt, und der Cloud-Speicher wird auf 1 GB begrenzt. Wenn die Kapazität des Cloud-Speicher überschritten wird, werden die Dateien nicht gesichert und die Bestellung- und Teilen-Funktionen sind nicht verfügbar.

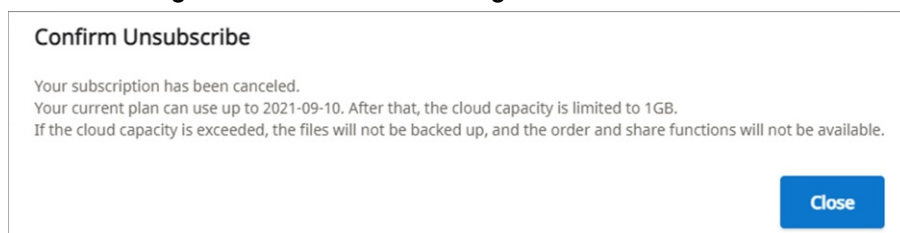

Abrechnungsinformationen

Sie können das Zahlungsverhalten für Mitgliedsabonnements überprüfen, einschließlich einer Rechnung für jede Zahlung. Sie können auch eine Zahlungsmethode hinzufügen oder ändern, die ab der nächsten geplanten Zahlung angewandt wird.

The screenshot shows the 'Billing Info' tab selected in the MEDIT Link interface. The page displays membership details and a billing history table.

My Plan and Billing Information

Plan	Premium
Amount	0.99\$ USD / Monthly
Next Payment Date	2021-09-09
Payment Method	Visa *****4242 (11/21) Stripe Edit Payment Method

If you haven't subscribed yet?
Experience a differentiated premium.

Billing History

Payment Date	Membership	From	To	Payment Amount	Status
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-10	0.99 \$ (USD)	Payment Completed
2021-09-09	Premium	2021-09-09	2021-09-09	0 \$ (USD)	Payment Completed

So fügen Sie eine Zahlungsmethode hinzu

1. Klicken Sie auf „Zahlungsmethode bearbeiten“.

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Edit Payment Method' button in the 'Payment Method' section is highlighted with a red rectangle to indicate the next step in the process.

2. Klicken Sie auf „Zahlungsmethode hinzufügen“.

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHOD

VISA **** 4242 Default

Expires 11/2021

+ Add payment method

3. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf „Hinzufügen“.

Add payment method

Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s Terms of Service and Privacy Policy.

4. Die neu hinzugefügte Zahlungsmethode wird als Standard festgelegt und für die nächste Zahlung benutzt.

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

PAYMENT METHODS



+ Add payment method

So ändern Sie eine Zahlungsmethode

1. Klicken Sie auf das erweiterte Menü-Symbol neben der Zahlungsmethode, die Sie im Abrechnungs-Dialogfenster ändern möchten.

Billing

CURRENT PLANS

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.


PAYMENT METHODS



+ Add payment method

2. Klicken Sie auf „Standard“, um die ausgewählte Karte als Standard-Zahlungsmethode einzustellen.



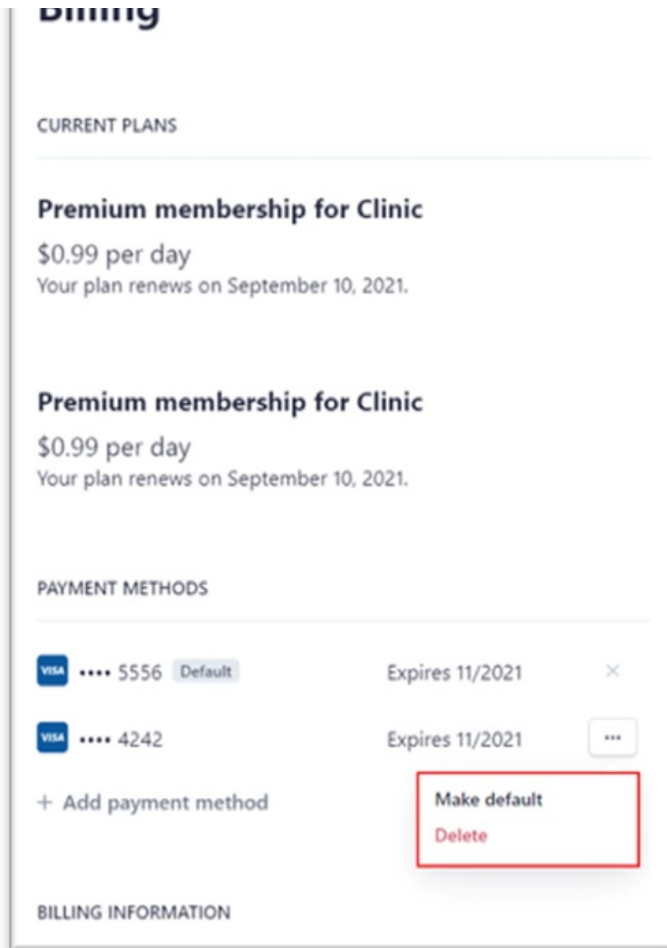


Einlösen

Anmelden Sie den Einlösecode, den Sie im Rahmen der Werbeaktion erhalten haben. Sie können die Premium-Mitgliedschaft mit dem Einlösecode benutzen.

Einlösecode registrieren

1. Geben Sie den Einlösecode ein und klicken Sie auf „Anmelden“.

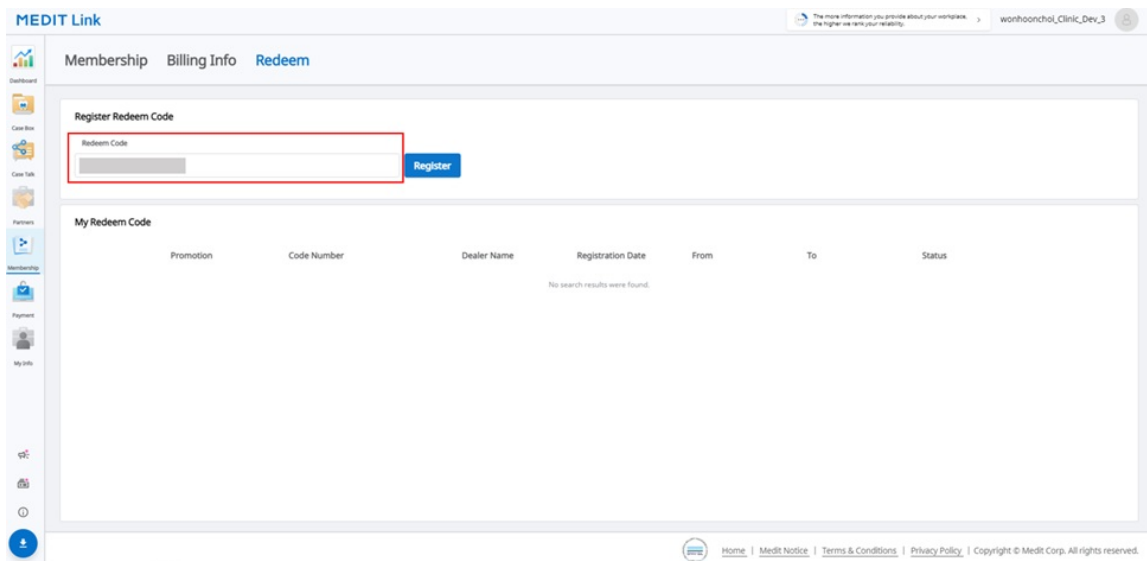

2. Lesen Sie den Hinweis und wählen Sie „Anmelden“ oder „Anwenden“ in dem Pop-up-Dialog.
 - **Anmelden:** Melden Sie den Einlösecode an. Sie können den Einlösungscode später nach der Registrierung aktivieren und benutzen.
 - **Anwenden:** Anmelden und aktivieren Sie den Einlösecode. Der Aktionsrabatt gilt sofort.

Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.
Periodic payments are stopped automatically.

Close

Register

Apply

Einlösecode aktivieren

Sie können mehrere Einlösecodes anmelden, aber Sie müssen den Code, den Sie benutzen möchten, aktivieren.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktivieren“ neben dem Code, den Sie benutzen möchten. Wenn es keinen Code mit dem Status „Aktiv“ gibt, wird der von Ihnen gewählte Code sofort angewandt. Wenn ein Code bereits aktiviert ist, ändert sich sein Status in „Warten“ und der von Ihnen ausgewählte Code wird stattdessen benutzt. Wenn der aktuelle Einlösecode abläuft, wird der wartende Code automatisch wieder aktiviert.

2. Hinweis

Nur ein Code kann sich im Status „Warten“ befinden.

The screenshot shows the MEDIT Link web application interface. The top navigation bar includes 'Membership', 'Billing Info', and 'Redeem'. The 'Redeem' section is active, showing a 'Register Redeem Code' form with a 'Redeem Code' input field and a 'Register' button. Below this, the 'My Redeem Code' table displays four entries. Each entry has columns for Promotion, Code Number, Dealer Name, Registration Date, From, To, and Status. The 'Status' column for each entry contains a 'Registered' button and an 'Activate' button. The 'Activate' button for the first entry is highlighted with a red box.

Promotion	Code Number	Dealer Name	Registration Date	From	To	Status
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Yoshida	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate
Test Promotion - 1 month		Medit Link	2021-09-09	-	-	Registered Activate

Zahlung

Hinweis


Der folgende Dienst ist auf Medit Link China nicht verfügbar.

- Zahlung

Zahlungseinzelheiten (Praxis & Labor-Konten)

Sie können den Zahlungs- und Transaktionsverlauf zwischen Ihnen und Ihren Partner über die Seite Zahlungseinzelheiten überprüfen.

Zahlung Konto-Informationen (nur Labor-Konto)

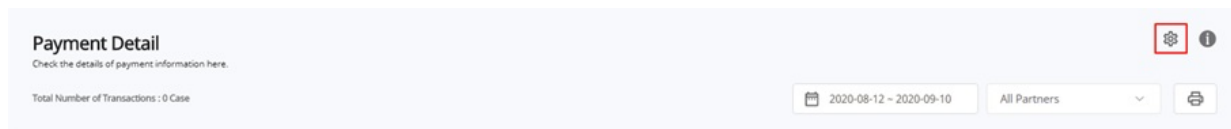

Diese Funktion steht nur dem Labor-Verwalterkonto zur Verfügung, damit dieser Informationen eingeben kann, um von Ihren Partner bezahlt zu werden.

- Sie müssen Ihre Zahlung Konto-Informationen für Ihre Partner eingeben, um Bestellungen über das Online-Zahlungssystem zu platzieren.

Hinweis

Wenn Sie ein Land auswählen, in dem Stripe unterstützt wird, werden Sie zu Stripe weitergeleitet, indem Sie auf eine Schaltfläche klicken, um sich für Stripe registrieren zu lassen.

Sie können Südkorea auswählen, dann können Sie eine lokale Bank-Kontonummer eingeben, um die Zahlung zu erhalten, und KCP wird Ihre Zahlung abwickeln.

meine Informationen

Mein Konto

Hier können Sie die von Ihnen bei der Registrierung angegebenen Daten einsehen und bearbeiten und Ihren Mitgliedschaftsstatus überprüfen.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

Account Information



1 JPG, GIF, or PNG only. Max size of 10 MB.

Email Address
coldgreentea@naver.com [Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
wonhoonchoi_Lab3

Language
한국어 (대한민국) [▼](#)

Country
Korea, Republic of [▼](#)

1 Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

Subscription Information

[Subscribe](#)

Standard

Organization Information

[Edit Information >](#)

Organization Name
wonhoonchoi_Lab3

Meine Organisation (nur Admin-Konto)

Hier können Sie die Informationen über Ihre Organisation überprüfen und bearbeiten. Dieser Bereich ist nur für Konten vom Verwalter-Typ verfügbar.

[My Account](#) [My Organization](#) [My Scanner](#) [My Price List](#)

[✓ Address Information](#) [✓ Organization Information](#) [⊖ Additional Information](#)

Address Information (Mandatory) *

Address 1 *

23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea [View Location on Map](#)

1 Street Address, P.O. Box, Company Name, C/O
1 Please enter the correct address so labs can check your company's location on the map.

Address 2

Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

1 Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

Zip/Postal Code * City *

02835 Seoul

Country * State/Province *

Korea, Republic of Seoul

1 If you have a contract history, you cannot change the country information. Please contact Medit Link's operation team.

Office Phone * Mobile Phone (Optional)

+ 82 01026088546 + 82 01026088546

Mein Scanner

Sie können die Informationen über die angeschlossenen Geräte für das Konto überprüfen.

my Account my Organization my Scanner my Price List									
No.	Type	Serial Number	Usage Time ⓘ	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry Da...	Days Left ⓘ	
1	i500	AA1909103895	1d 3h 4m	-	2020-07-06 09:48	2019-09-30	2021-03-30	Purchase -738 Days	
2	Hybrid	1H16091L9003	3d 22h 31m	-	2020-06-24 12:08	2016-09-27	2018-09-26	Purchase -1654 Days	

Meine Preisliste (nur Labor Admin-Konto)

Sie können die von Ihrem Labor angebotenen Produkte und die Preisinformationen für jedes Produkt eingeben.

My Account

My Organization

My Scanner

My Price List

Teeth

Arch

AED (Q.A)

✓ All (99/557)

Inlay (8/12)

Onlay (8/12)

Coping (10/17)

Denture Coping (5/5)

Crown (15/26)

Porcelain (23/36)

Post & Core (3/4)

Veneer (8/11)

Implant Crown (12/53)

Custom Abutment (2/3)

Surgical Guide (1/1)

Offset Substructure (4/5)

Partial Denture (9/7)

Diagnostic Wax Up (0/1)

Custom Abutment + Implant Crown (0/159)

Custom Abutment + Coping (0/45)

Post & Core + Crown (0/100)

Post & Core + Coping (0/60)

	Name	Type	Method	Material	Price
	인레이 지로코니아	Inlay	-	Zirconia	56.03
	인레이 골드	Inlay	-	Gold	1.03
	인레이 프레스 세라믹	Inlay	-	Press Ceramic	2.03
	인레이 레진	Inlay	-	Resin	3.03
	인레이 하이브리드 세라믹	Inlay	-	Hybrid Ceramic	4.03
	인레이 글라스 세라믹	Inlay	-	Glass Ceramic	1.00
	인레이 컴퍼지트 레진	Inlay	-	Composite Resin	1.00
	인레이 e.max	Inlay	-	e.max	1.00

Save

!Hinweis

- Sobald Sie einen Vertrag mit einem Partner abgeschlossen haben, kann Ihr Partner Ihre Produkte auf der Grundlage dieser Produktliste und des Preises bestellen.
- Wenn Sie nur eine Partnerschaft mit Ihrem Partner haben, unterstützt Medit Link keine Bestellungen, die Preisinformationen erfordern.

Hinweis & Aktualisierung

Sie können die wichtigen Hinweise von Medit und die Programmaktualisierungen der Medit-Software überprüfen.

Notice & Update

Notice

NFT Service Termina...

2023-04-19

Notice

End of Support Notic...

2023-04-14

Update

Release Note for Me...

2023-03-29

Notice

[Medit] We've updat...

2023-03-29

Update

Release Note for Me...

2023-03-17

Update

Medit Occlusion Ana...

2023-03-08

Notice

NFT Service Termination Notice

2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Medit Informationen

Hier erhalten Sie verschiedene Informationen zum Benutzen von Medit Link. Greifen Sie auf die Bildungs- und Informationsressourcen von Medit zu, wie z.B. die Medit Academy, Medit Academy YouTube und das Medit Hilfe-Center.

Need more help?



Medit Academy >


YouTube >

Help Center >


Medit Link App herunterladen

Sie können die neueste Version des Programm-Installationsprogramms aus dem Internet herunterladen. Dieses Menü ist hilfreich, wenn Sie das im Produktpaket enthaltene Installationsprogramm verloren haben oder wenn Sie ein veraltetes Installationsprogramm haben.

Medit Link wird automatisch aktualisiert, wenn Sie eine Internetverbindung haben.

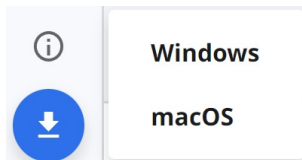

Übersicht

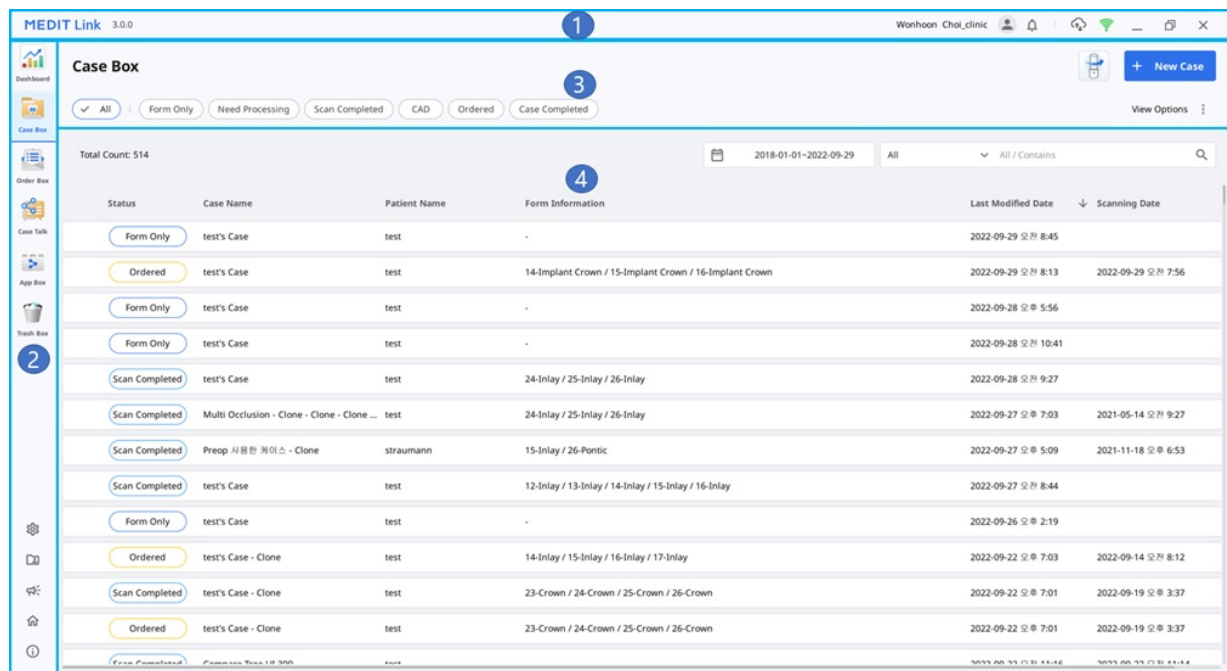

1	Titelleiste	Detaillierte Informationen finden Sie unter Medit Link App > Titelleiste .
2	Menü	Detaillierte Informationen finden Sie unter Medit Link App > Menü .
3	Werkzeuge und Funktionen	Detaillierte Informationen finden Sie unter Medit Link App > Datei-Viewer und Medit Link App > Ansichtsoptionen .
4	Fall-Liste	Detaillierte Informationen finden Sie unter Medit Link App > Filtern und Suche .

Box Übersicht

Arbeitsablauf		Praxis-Konto	Labor-Konto
Schritt 1	Fälle erstellen	Case Box: Erstellen Sie Fälle und durchsuchen Sie diese mit verschiedenen Filtern- und Suchoptionen. Mit dem erstellten Fall können Sie sich direkt mit Scan- und CAD-Programmen verbinden, um ihn zu bearbeiten.	
Schritt 2	Fälle bestellen/verwalten	Order Box: Verwalten Sie bestellte Fälle. Es werden Funktionen zur Verwaltung des Prozesses von der Bestellung bis zur Fertigstellung der Fälle bereitgestellt.	In Box: Verwalten Sie Fälle von eingegangenen Bestellungen. Sie erhalten Funktionen zur Verwaltung des Prozesses der Annahme, Ablehnung, des Versands und der Fertigstellung von Fällen.
Schritt 3	Arbeiten am Scannen/CAD		Work Box: Verwalten Sie Fälle, die aus In Box weitergeleitet wurden oder die Sie selbst erstellt haben. Sie können sie direkt mit Scan- und CAD-Programmen verbinden, um sie zu bearbeiten.
Schritt 4	Fälle teilen	Case Talk: Teilen Sie die erstellten Fälle mit Einschränkungen, ohne Einschränkungen, mit bestimmten Personen oder anderen	


4		registriert Mitgliedern von Medit Link.
Schritt 5	Ergänzende oder zusätzliche Arbeit	App Box: Benutzen Sie eine Vielzahl von Apps, die Ihren Arbeitsablauf in der digitalen Zahnmedizin ergänzen. Sie können Medit- oder Drittanbieter-Apps herunterladen und installieren.
Schritt 6	Fälle löschen/wiederherstellen	Trash Box: Sie können Fälle aus dem Trash Box anzeigen, wiederherstellen oder dauerhaft löschen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Boxen, die in jeder Art der Praxis- und Labor-Konto verfügbar sind.

Konto-Typ		Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box	App Box
Praxis-Konten	Administrator	O	O	X	X	O	O	O
	Mitglied	O	X	X	X	O	O * Nur Wiederherstellen-Funktion	O
Labor-Konten	Administrator	X	X	O	O	O	O	O
	Mitglied	X	X	X	O	O	O * Nur Wiederherstellen-Funktion	O

Meine Information

Die Titelleiste bietet schnellen Zugriff auf Funktionen wie Netzwerkstatus, Cloud-Synchronisierung und Benachrichtigungen.

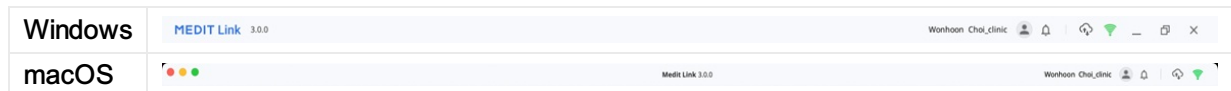

Meine Information

Meine Informationen enthält grundlegende Benutzerinformationen wie Profilbild, Organisationsname, E-Mail-Adresse und Benutzername.

Außerdem finden Sie hier eine Abmeldeoption und eine Verknüpfung zur Seite Mein Konto in Medit Link Web.

My Information

1



2

Organization Name

Wonhoonchoi_Clinic_Dev

Email Address

wonhoon.choi@medit.com

Name

Wonhoonchoi_Clinic

3

Close

4

Log Out

Edit >

- | | |
|---|--|
| 1 | Zeigen Sie das Profilbild an. |
| 2 | Zeigen Sie den Organisationsname, die E-Mail-Adresse und den Benutzernamen an. |
| 3 | Ausloggen aus dem aktuellen Konto. |
| 4 | Gehe zu Medit Link Web, während Sie mit dem aktuellen Konto eingeloggt sind. Sie können die Konto-Informationen, die Sie bei der Registrierung eingegeben haben, anzeigen, bearbeiten und verwalten. |

Benachrichtigungen

Sie können Benachrichtigungen zu Verträgen, Bestellungen und Arbeitsprozessen sehen.



Notification

1 ☐ Display Unread Messages Only [Mark All As Read](#)

2

Delivery 2020-08-20 오후 5:20 

Wonhoonchoi_Lab_Dev has dispatched the ordered package.

Order 2020-08-20 오후 5:18

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order 2020-08-17 오후 4:05

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order 2020-08-17 오후 4:05 

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order 2020-08-17 오후 4:05 

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Order 2020-08-17 오후 4:05 

Wonhoonchoi_Lab_Dev has accepted the order.

Work 2020-08-14 오후 6:33 

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

Work 2020-08-14 오전 10:15 

Wonhoonchoi_Clinice_Dev_Member registered a new case test's Case.

[Close](#)

1	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nur die ungelesenen Nachrichten anzuzeigen.
2	Klicken Sie auf eine beliebige Benachrichtigung, um sofort zu dem entsprechenden Fall oder der entsprechenden Webseite zu verschieben.

Fall-Synchronisierungs-Manager

Der Fall-Synchronisierungs-Manager hilft Ihnen beim Hochladen und Herunterladen der Fälle in Medit Link. Sie können mehrere Fälle in die Cloud hochladen oder sie auf Ihren lokale PC herunterladen.

Case Synchronization Manager

Upload

Download

Total Count: 240

Cancel All

Download All

Case Name	Date Modified ↓	Size	Status
☐ test's Case	2021-09-07	318.58 MB	Need Download
☐ test scan	2021-09-02	626.09 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-09-02	6.61 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-26	127.31 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-24	172.75 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-23	516.34 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-19	74.13 MB	Need Download
☐ test's Case111111111111111111111111121312312313131233311111111111111111144444444	2021-08-19	133.15 MB	Need Download
☐ 2.3.6 Case - Clone - Clone - Clone - 복제 - 복제 - Clone	2021-08-19	234.72 MB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-19	496.65 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-13	248.79 kB	Need Download
☐ test's Case	2021-08-13	149.20 MB	Need Download

Close

Upload

Download

Total Count: 240

Cancel All

[Download All](#)[illegible]

Close

Hochladen

Gesamte Fälle / Ausgewählte Fälle	Überprüfen Sie die Anzahl aller/ausgewählter Fälle, die hochgeladen werden müssen.
Alle hochladen	Alle Fälle in die Cloud hochladen.
Alle abbrechen	Alle Anfragen zum Hochladen abbrechen.
	Den Fall in die Cloud hochladen.
	Abbrechen des Hochladens des Falls.
	Das Hochladen des Falls erneut versuchen.

Herunterladen

Gesamte Fälle / Ausgewählte Fälle	Überprüfen Sie die Anzahl aller/ausgewählter Fälle, die heruntergeladen werden müssen.
Alle herunterladen	Herunterladen Sie alle Fälle auf den PC.
Alle abbrechen	Alle Anfragen zum Herunterladen abbrechen.
	Herunterladen des Falls auf den PC.
	Abbrechen des Herunterladens des Falls.

 Das Herunterladen des Falls erneut versuchen.

Netzwerkstatus

Medit Link ermöglicht es Ihnen, alle Funktionen nahtlos zu benutzen, wenn Sie mit einem Netzwerk verbunden sind.

Damit Sie den Status Ihrer Netzwerkverbindung in Echtzeit überprüfen können, wird das Symbol für den Netzwerkstatus in der Titelleiste angezeigt.

Wenn die Netzwerkverbindung nicht gut ist, können die folgenden Einschränkungen auftreten:

- Einige Funktionen, wie z.B. die Bestellung eines Falls, die Erstellung eines Falls, die Teilen über Case Talk und die Cloud-Synchronisierung, sind eingeschränkt.
- Die Gesamtleistung des Dienstes kann aufgrund der Auswirkungen der Netzwerkkumgebung reduziert sein.

In diesem Fall können Sie in den Offline-Modus wechseln, um grundlegende Aufgaben auszuführen, und dann die Funktionen benutzen, die Internet erfordern, sobald Sie verbunden sind.

iHinweis


Das Netzwerksymbol zeigt die Reaktionsgeschwindigkeit zwischen dem aktuellen Bereich und AWS (Amazon Web Service) an. Es bedeutet nicht die Geschwindigkeit Ihres Netzwerks. Daher kann es sein, dass der Status als schlecht oder schlecht angezeigt wird, obwohl Ihre Netzwerkgeschwindigkeit ausreichend hoch ist.

Wenn ein anderer Prozess dasselbe Netzwerk benutzt, kann die Geschwindigkeit gering oder schlecht sein, und die Gesamtleistung von Medit Link könnte schlecht sein. In diesem Fall sollten Sie das Netzwerk nicht mit anderen Prozessen teilen.

Zum Beispiel ist die Funktion „Rohdaten hochladen“ ein großer Teil des Netzwerkprozesses. Wenn das Symbol einen schlechten Status anzeigt, gehen Sie zu Einstellungen > Rohdaten hochladen und schalten Sie „Automatisch hochladen“ aus.


Dashborad

Sie können die Gesamtstatistik für die gesamte auf Medit Link geleistete Arbeit in visualisierten Grafiken und Diagrammen anzeigen - beide in der Medit Link App als auch im Web.

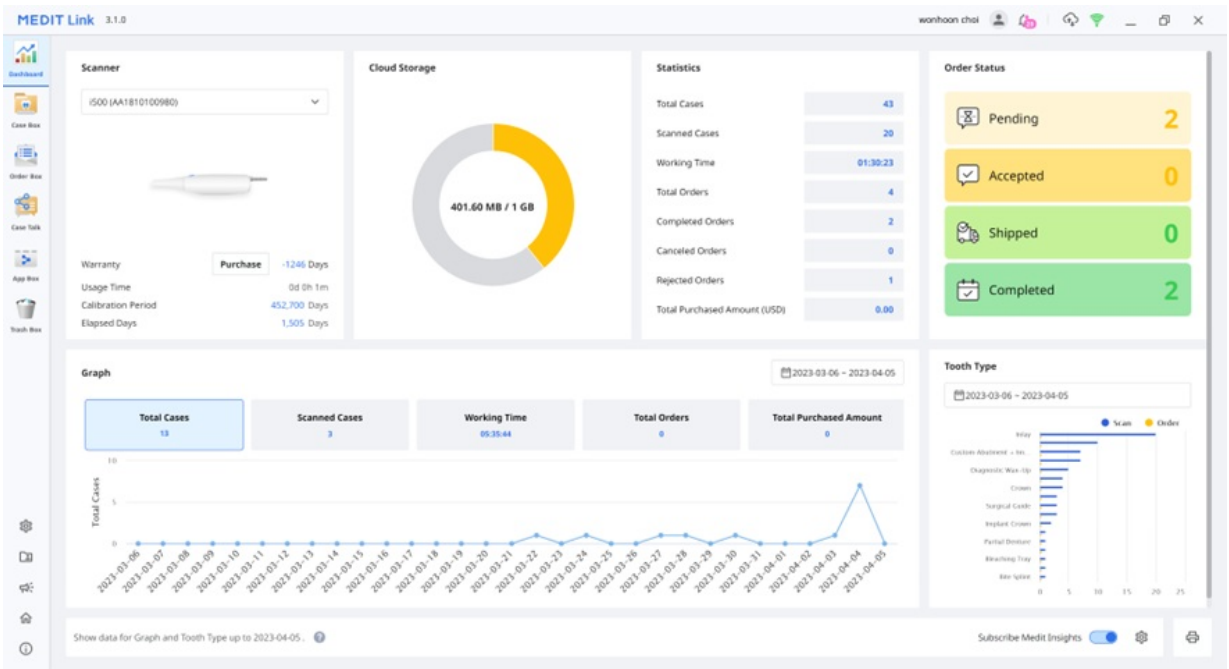

Hinweis
Weitere Informationen über das Dashboard und Medit Insights finden Sie im [Medit Link Web > Dashboard](#).

Case Box/Work Box

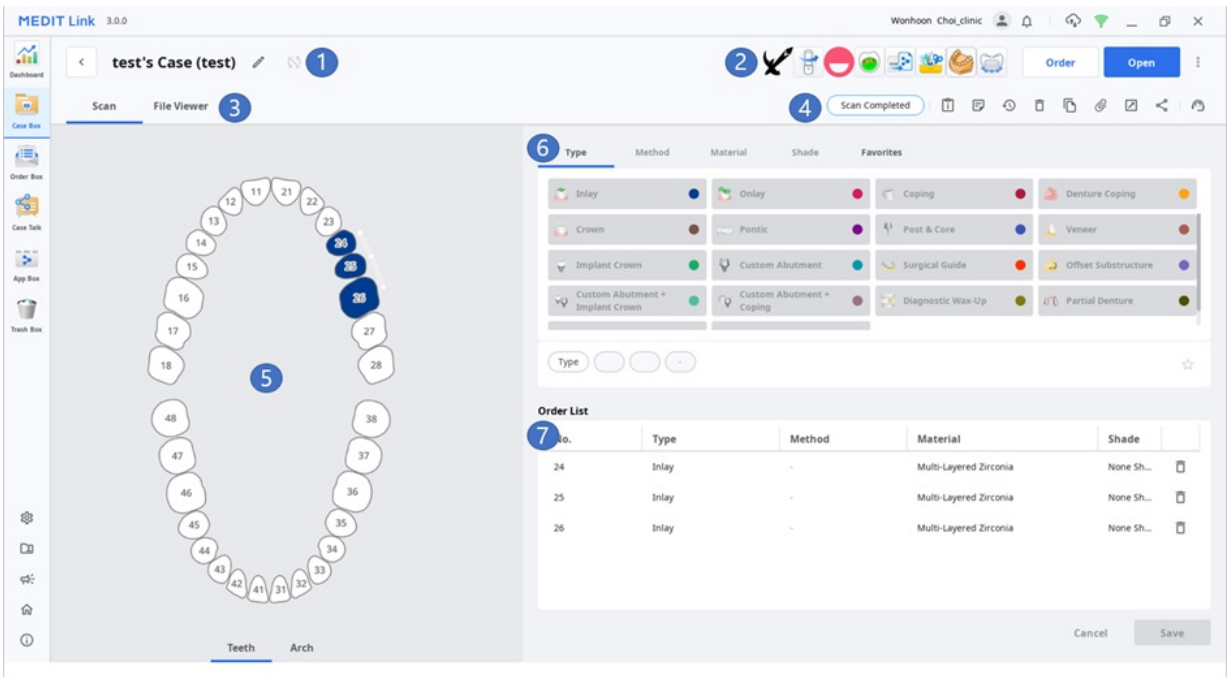

- 1 Zeigen Sie den Fallname und den Patientennamen an.
- ~ Stellen Sie die wichtiasten Funktionen zur Verfüauna: Schaltflächen

2	Bestellung/Scannen(Öffnen)/Bestellung und Apps-Symbole.
3	Verfügbare Tabs anzeigen: Formular, CAD und Datei-Viewer.
4	Funktionen zur Verwaltung von Fällen und Dateien anzeigen.
5	Zeigen Sie die Benutzeroberfläche für die Formularregistrierung für das ausgewählte CAD-Programm an.
6	Stellen Sie die Informationen zu Typ/Methode/Material/Farbtoninformationen bereit, die Benutzer für die ausgewählte Zahnnummer auswählen können.
7	Anzeige der Typ/Methode/Material/Farbtoninformationen, die auf die ausgewählten Zähne angewandt wurde.

Tabs in der Case Box/Work Box

Formular	CAD	Datei-Viewer
Die Tab Formular bietet eine Benutzeroberfläche für die Eingabe grundlegender Informationen für die Scanarbeit, wie z.B. Typ, Methode, Material für Zahnnummern und Scanoptionen. Die Informationen, die Sie eingeben, werden an das verbundene Scanprogramm weitergegeben und bei der Bestellung an Ihren Partner als Bestellinformationen benutzt.	Die Tab CAD bietet eine Benutzeroberfläche zum Einstellen von CAD-Optionen. Die Informationen, die Sie einstellen, werden an das verbundene CAD-Programm weitergegeben.	Anzeigen Sie die von Scanprogrammen und CAD generierten Ergebnisdateien. Der Datei-Viewer zeigt und verwaltet die erfassten oder angehängten 3D-Modelle und 2D-Bilder.

Funktionen in Case Box/Work Box

Die folgenden Funktionen stehen Ihnen in der Case Box/Work Box zur Verfügung.

	Fallstatus	Zeigt den Status des Falles an.
	Gehe zu Einzelheiten	Bietet eine Verknüpfung für denselben Fall in einer anderen Box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Fallinformationen	Überprüfen Sie die Fall Einzelheiten und speichern Sie sie als PDF oder drucken Sie sie aus.
	Notiz & Tags	Fügen Sie eine Notiz oder Tags hinzu, wenn Sie einen Fall anmelden oder bestellen. Benutzen Sie diese, um Ihren Partner zusätzliche oder ergänzende Informationen über den Fall mitzuteilen.
	Fallgeschichte	Bietet detaillierte Informationen über den Fallgeschichte. History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close

	Löschen	Löschen Sie den Fall. Sie können keine bestellten Fälle oder offline erstellte Fälle löschen
---	---------	--

		Sie können keine Bestellungen für oder ohne erstellte Fälle löschen.
	Klonen	Ein Duplikat des aktuellen Falls in der Case Box erstellen. Alle Daten werden in den geklonten Fall kopiert. Mit dieser Funktion können Sie Behandlungsinformationen für denselben Patienten replizieren oder eine zusätzliche Bestellung mit denselben Informationen oder Dateien stellen.
	Anhängen	Hängen Sie Dateien in verschiedenen Formaten an.
	Exportieren	Exportieren Sie Scan- oder CAD-Ergebnisdateien auf den lokalen PC. Sie können beim Exportieren der Dateien Ihr bevorzugtes Dateiformat wählen. Die exportierten Dateien können für die weitere Arbeit in CAD- und CAM-Software benutzt werden.
	Teilen	Erstellen Sie einen Link zur gemeinsamen Nutzung. Benutzer mit dem geteilten Link können auf die 3D-Daten in einem Browser wie Chrome, Firefox oder Safari zugreifen, ohne zusätzliche Programme zu installieren. Sie können den Link frei mit jedem oder nur mit bestimmten Personen teilen. Sie können einen PIN-Code oder ein Verfallsdatum für den Link festlegen, um private Informationen zu schützen.
	Hilfsantrag einreichen	Landen Sie auf einer Seite des Medit Hilfe-Center, um eine Support-Anfrage zu stellen.

Order Box/In Box

- 1 Zeigen Sie den Fallname und den Patientennamen an.
- 2 Bereitstellung von Funktionen für die Bestellverwaltung (Akzeptieren/Abgebrochen; Liefern/Empfangen).
- 3 Verfügbare Tabs anzeigen: Bestellung, Datei-Viewer
- 4 Zeigt Funktionen zur Verwaltung von Fällen und Dateien an: Fallstatus, Verknüpfungen für detaillierte Informationen, Fallinformationen, Notiz & Tags usw.

5	Zeigen Sie die detaillierte Information für die Bestellung an, einschließlich der Bestellnummer, Patientenname, Partnername, Scandatum, Bestelldatum, Lieferdatum und Notiz & Tags.
6	Zeigen Sie die Informationen zum bestellten Produkt und den Lieferstatus an.

Tabs in Order Box/In Box

Bestellung	Datei-Viewer
Überprüfen Sie die detaillierten Informationen zum Bestellung, wie Bestellnummer, Patientename, Kontoname, Scandatum, Bestelldatum, Lieferdatum, Notiz und Tags.	Betrachten Sie die durch Scan-/CAD-Vorgänge erzeugten Dateien. Der Datei-Viewer zeigt und verwaltet die erfassten oder angehängten 3D-Modelle und 2D-Bilder.

Case Talk

In Medit Link erstellte Fälle können mit bestimmten Personen, die Sie angeben, mit jedem, der den geteilten Link hat, oder mit registriert Mitgliedern von Medit Link geteilt werden.

Der Benutzer kann eine Liste aller geteilten Fälle über „Case Talk“ in der Medit Link App und Medit Link Web sehen.

iHinweis

Der Dienst „Case Talk“ erfordert eine Internetverbindung.

MEDIT Link 3.0.0
Woonhoon Choi_clinic

Dashboard
 Case Box

 Order Box
 Case Talk

 App Box
 Trash Box

Case Talk

2018-01-01 ~ 2022-09-29

Case Talk Name

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanning Date	Shared Date ↓	Expiration Date
test's Case_262 - Clone_2022-08-05 18:00:05	test	14, 15, 16, 17	2022-07-28 08:27	2022-08-05 18:00	2022-11-03 23:59
Wonhoonchoi_real - Clone_2022-07-25 18:09:10	test1	Maxilla, Mandible	-	2022-07-25 18:09	2022-10-23 23:59
Wonhoonchoi_real - Clone_2022-07-25 18:02:36	test1	Maxilla, Mandible	-	2022-07-25 18:02	2022-10-23 23:59
Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Cl_2022-07-21 11:58:18	test	24, 25, 26	2021-05-14 09:27	2022-07-21 11:58	2022-10-19 23:59
Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Cl_2022-07-21 11:57:54	test	24, 25, 26	2021-05-14 09:27	2022-07-21 11:57	2022-10-19 23:59
Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Cl_2022-07-21 11:56:47	test	24, 25, 26	2021-05-14 09:27	2022-07-21 11:56	2022-10-19 23:59
test1's Case_2022-07-14 14:45:16	test1	Maxilla	2022-07-06 10:36	2022-07-14 14:45	2022-10-12 23:59

Geteilte Fälle können über einen Webbrowser angezeigt werden, ohne dass ein separates Programm installiert werden muss, was eine einfache Kommunikation über die 3D-Daten auf verschiedenen Geräten ermöglicht.

App Box

App Box bietet verschiedene Add-In-Programme, die Ihren grundlegenden Scan-Arbeitsablauf ergänzen und die Produktivität steigern.

Medit Apps umfasst von Medit entwickelte Originalsoftware und Integrations-Apps mit unseren Partnern aus verschiedenen Bereichen der digitalen Zahnmedizin wie 3D-Druck, andere CAD/CAM-Software usw.


Laden Sie die verfügbaren Apps von Medit Apps und der Partner-App herunter, um dental Geräte zu erstellen, Scandaten zu analysieren, Sie während einer Konsultation zu unterstützen oder Ihren Arbeitsablauf zu optimieren.

MEDIT Link
3.1.0

wanhoon chai

Dashboard
App Box

Search by App Information

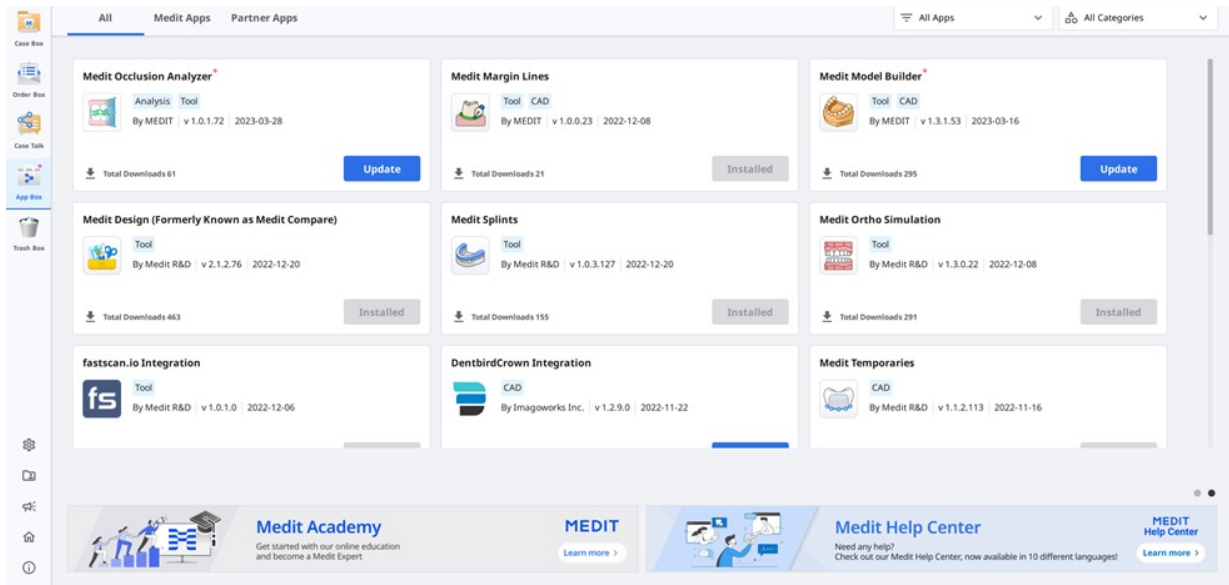

Trash Box

Der Trash Box speichert vorübergehend die gelöschten Fälle. Jeder Fall im Trash Box kann entweder wiederhergestellt oder dauerhaft gelöscht werden.

⚠ Vorsicht

Die aus dem Trash Box gelöschten Daten werden dauerhaft von Ihrem PC und dem Server gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon_Choi_clinic

Trash Box

Restore Delete Total Count: 30

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date	Deleted By	Size
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon_Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon_Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon_Choi_clinic	816 KB
☐ Form Only	wonhoonchoi's Case	wonhoonchoi		2022-09-21 12:13	Wonhoon_Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon_Choi_clinic	10,204 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon_Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon_Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon_Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon_Choi_clinic	3,628 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon_Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon_Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:13	Wonhoon_Choi_clinic	0 KB
☐ Form Only	test's Case	test		2022-09-21 12:11	Wonhoon_Choi_clinic	4,469 KB

Einstellungen

Detaillierte Informationen zum Einstellungsfenster finden Sie in der [Medit Link App > Einstellungen](#).

Patientenverwaltung

Im Fenster Patientenverwaltung können Sie Patienten hinzufügen, bearbeiten, löschen oder zusammenführen.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date	
☒	S-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				3	2020-09-18	2020-09-18	
☒	S-9_Scan_CAMOrder_Teeth2				1	2020-09-18	2020-09-18	
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17	
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17	
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☒	ASD Demo				1	2020-09-16	2020-09-16	
☐	gnt				1	2020-09-15	2020-09-15	
☐	Medit Link 2.3.0			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14	
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	测试测试				2	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13	
☐	test1231				26	2019-07-25	2020-09-11	

Close

Neuen Patienten hinzufügen

1. Klicken Sie auf „Neuer Patient“.

New Patient

Patient Name*

Add new patient

General

☐ Female ☐ Male

Birth Date

YYYY mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Creating patient information involves consent from the patient.
 Patient information can be shared with 3-parties on order.

[Terms & Conditions](#)

Cancel Save

2. Füllen Sie die erforderlichen Informationen im Dialogfeld „Neuer Patient“ aus und klicken Sie dann auf „Speichern“.

Patienten löschen

iHinweis

Sie können einen Patienten löschen, wenn es keine Fälle für den Patienten gibt.

1. Wählen Sie den Patienten, den Sie löschen möchten, aus der Liste aus.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	test				0	2019-08-28	2019-09-02		
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	test				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	A.I. Abusement?				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	Scarboby				0	2019-08-28	2019-08-28		
☐	Margin Line Creation				0	2019-08-22	2019-08-22		
☐	Abusement Library				0	2019-08-28	2019-08-22		
☐	GuideMessage				0	2019-08-28	2019-08-16		
☒	margin				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test2				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	salkjaskid				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test				0	2019-08-28	2019-08-07		
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-26		
☒	test				0	2019-08-28	2019-07-25		

Close

2. Klicken Sie auf „Löschen“.

Patienten zusammenführen

Sie können alle Fälle von mehreren Patienten zu einem Patienten zusammenfassen.

1. Wählen Sie aus der Liste den Patienten aus, den Sie zusammenführen möchten.

Patient Management

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.
Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases, after merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.
Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date		
☐	5-9_iScan_CAMOrder_testh2				3	2020-09-18	2020-09-18		
☐	5-9_iScan_CAMOrder_testh2				1	2020-09-18	2020-09-18		
☒	test				2	2020-09-17	2020-09-17		
☒	test				22	2019-07-26	2020-09-17		
☒	test				1	2020-09-17	2020-09-17		
☒	ASO Demo				1	2020-09-16	2020-09-16		
☒	ASO Demo				1	2020-09-16	2020-09-16		
☒	gmt				1	2020-09-15	2020-09-15		
☐	Mvdr Link 2.3.3			2020-9-24	2	2020-09-14	2020-09-14		
☐	test				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	测试				2	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test3				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test1				1	2020-09-13	2020-09-13		
☐	test1231				26	2019-07-25	2020-09-11		

Close

2. Klicken Sie auf „Patienten zusammenführen“.
3. Wählen Sie den Zielpatienten, zu dem Sie alle Fälle zusammenführen möchten.
4. Alle Fälle werden mit dem Zielpatienten zusammengeführt und die Patienteninformation des Zielpatienten bleiben erhalten.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Klicken Sie auf „Anwenden“, um mit der Zusammenführung fortzufahren.

Hinweis & Aktualisierung


Sie können die wichtigen Hinweise von Medit und die Programmaktualisierungen der Medit-Software überprüfen.

Gehe zu Medit Link Web

Sie landen auf dem Medit Link Web unter dem Konto, mit dem Sie derzeit eingeloggt sind.


Medit Informationen

Hier erhalten Sie verschiedene Informationen zum Benutzen von Medit Link. Greifen Sie auf die Bildungs- und Informationsressourcen von Medit zu, wie z.B. die Medit Academy, Medit Academy YouTube und das Medit Hilfe-Center.

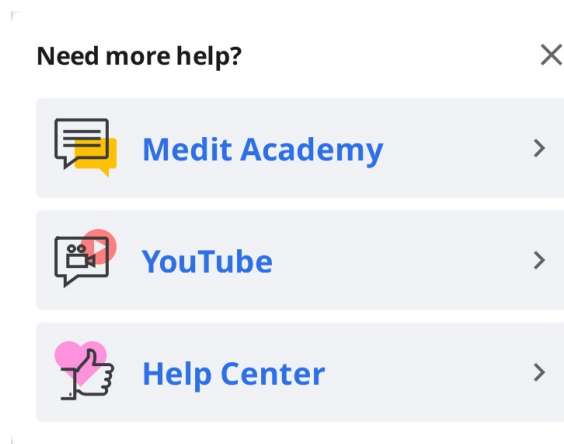

Allgemein

Bietet Optionen für die allgemeine Systemeinstellung.

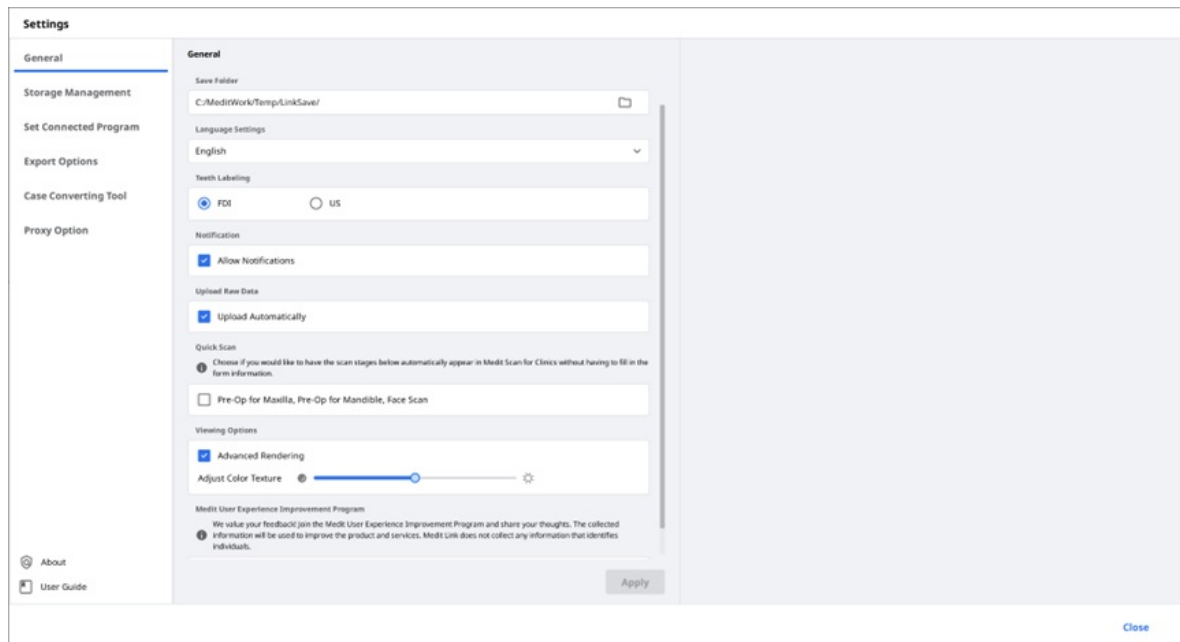


Ordner speichern	Geben Sie einen Ordner an, in dem die in Medit Link und angeschlossenen Programmen erzeugten Datenergebnisse gespeichert werden.	
Spracheinstellungen	Wählen Sie die Sprache für das Programm.	
Zahn-Kennzeichnung	Wählen Sie ein Zahn-Kennzeichnung System zwischen FDA und US.	
Benachrichtigungen	Wenn diese Option aktiviert ist, erhalten Sie Benachrichtigungen über Programmaktualisierungen.	
Rohdaten hochladen	Wenn dieses Option aktiviert ist, werden die Rohdaten automatisch in die Cloud hochgeladen. Sie hilft bei der Sicherung der Originaldaten und der Durchführung nahtloser Scans, wenn Sie Medit Link mit demselben Konto auf einem anderen PC benutzen. Die Sicherung der Originaldaten in der Cloud gilt nur für Daten, die in Medit Scan for Clinics erfasst wurden.	
Schnell-Scan	Wählen Sie, ob Sie die unten aufgeführten Scanstufen automatisch in Medit Scan for Clinics angezeigt bekommen möchten, ohne dass Sie die Formularinformationen ausfüllen müssen. • Prä-Op für Oberkiefer • Prä-Op für Unterkiefer • Gesichtsscan	
Ansichtsoptionen	Erweitertes Rendering	Wenn diese Option aktiviert ist, wird das 3D-Modell in einer lebendigeren und realistischeren Darstellung angezeigt.
	Farbtextur anpassen	Passen Sie die Helligkeit des 3D-Modells an. * Die resultierenden Farben können leicht von Medit Link abweichen, wenn Sie dieselben Daten mit einer anderen Software öffnen.
Medit	Werden Sie Teil des Medit Verbesserungsprogramm der Benutzererfahrung. • Wir benutzen die gesammelten Informationen, um unsere	

Verbesserungsprogramm der Benutzererfahrung

- Wir benutzen die gesammelten Informationen, um unsere Produkte und Dienste zu verbessern.
- Wir sammeln keine Informationen, mit denen Einzelpersonen identifiziert werden können.

Speicherverwaltung

Überprüfen und verwalten Sie den lokalen und den Cloud-Speicherplatz.

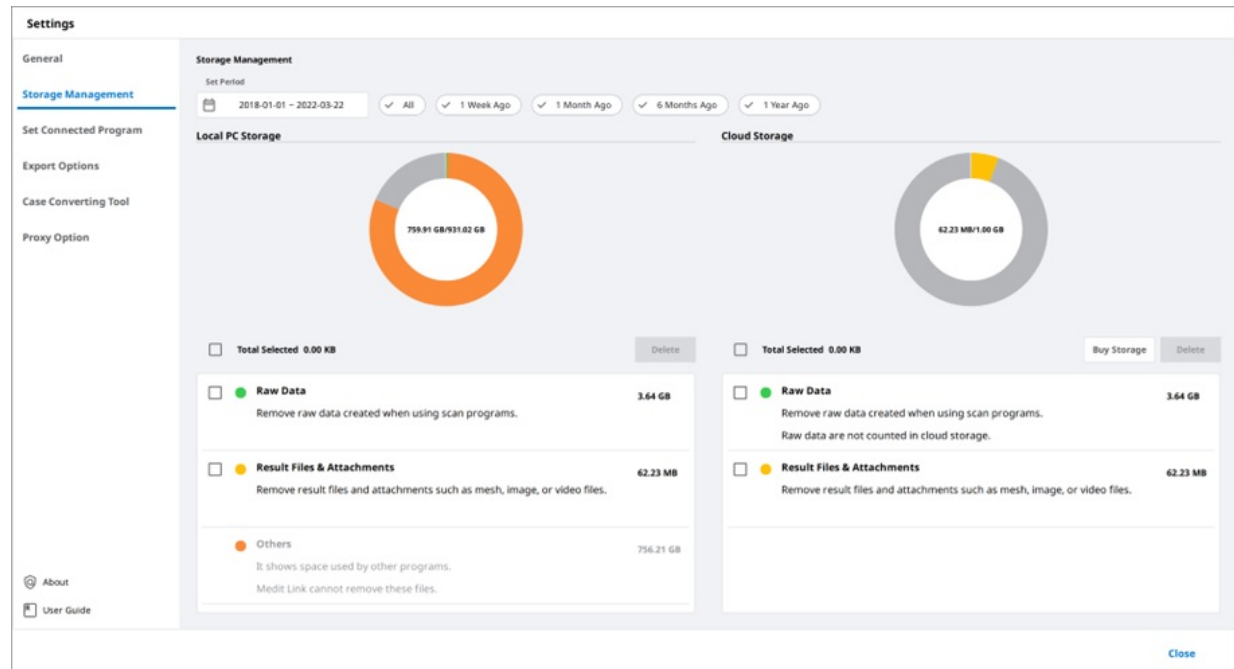

Zeitraum festlegen

Legen Sie einen bestimmten Zeitraum fest, um Daten zu löschen, die innerhalb des unten angegebenen Zeitrahmens erstellt wurden.

- Alle: Alle Dateien anzeigen.
- Vor 1 Woche: Sehen Sie sich die Dateien an, die eine Woche nach der Erstellung vergangen sind.
- Vor 1 Monat: Sehen Sie sich die Dateien an, die einen Monat nach der Erstellung vergangen sind.
- Vor 6 Monaten: Sehen Sie sich die Dateien an, die sechs Monate nach der Erstellung vergangen sind.
- Vor 1 Jahr: Sehen Sie sich die Dateien an, die ein Jahr nach der Erstellung vergangen sind.

Lokale Speicher

Verwalten Sie den PC-Speicherplatz.

Rohdaten	Entfernen Sie die ausgewählten Rohdaten vom PC. Wenn die Rohdaten bereits in die Cloud hochgeladen wurden, können Sie sie herunterladen und benutzen, wann immer Sie wollen.
Ergebnis & Anhang	Entfernen Sie die Ergebnis- und Anhangsdateien vom PC, wie z.B. Mesh, Bilder und Videos. Wenn diese Dateien bereits in die Cloud hochgeladen wurden, können Sie sie jederzeit herunterladen und benutzen.

Andere	Sehen Sie sich die Dateien an, die Sie zum Betrieb des Systems und anderer Programme benutzen. Es zeigt den Speicherplatz auf Ihrem PC an. Sie können diese Dateien nicht aus Medit Link entfernen
--------	--

	Entfernen Sie ausgewählte Dateien vom PC.
Löschen	Entfernen Sie ausgewählte Dateien vom PC.


Cloud-Speicher

Verwalten Sie den Cloud-Speicherplatz.

Rohdaten	Die Rohdaten nehmen keinen Platz im Cloud-Speicher ein und werden daher auch nicht im Pi-Diagramm angezeigt. Sie können die Rohdaten jedoch bei Bedarf von hier aus verwalten, z.B. löschen, um die privaten Daten des Patienten zu schützen, usw.
Ergebnis & Anhang	Die Ergebnis- und Anhangsdateien beanspruchen Platz in Cloud-Speicher. Wenn die Cloud voll ist, können Sie sich mehr Speicherplatz sichern, indem Sie nicht benötigte Dateien entfernen.
Speicher kaufen	Wenn Sie einen Standard-Tarif haben, abonnieren Sie den Premium-Tarif, um Ihren Cloud-Speicher zu erweitern.
Löschen	Entfernen Sie ausgewählte Dateien aus dem Cloud-Speicher, um den Speicherplatz freizugeben.

Verbundenes Programm einstellen

Verwalten Sie die Programme, die eine Integration in Medit Link unterstützen.

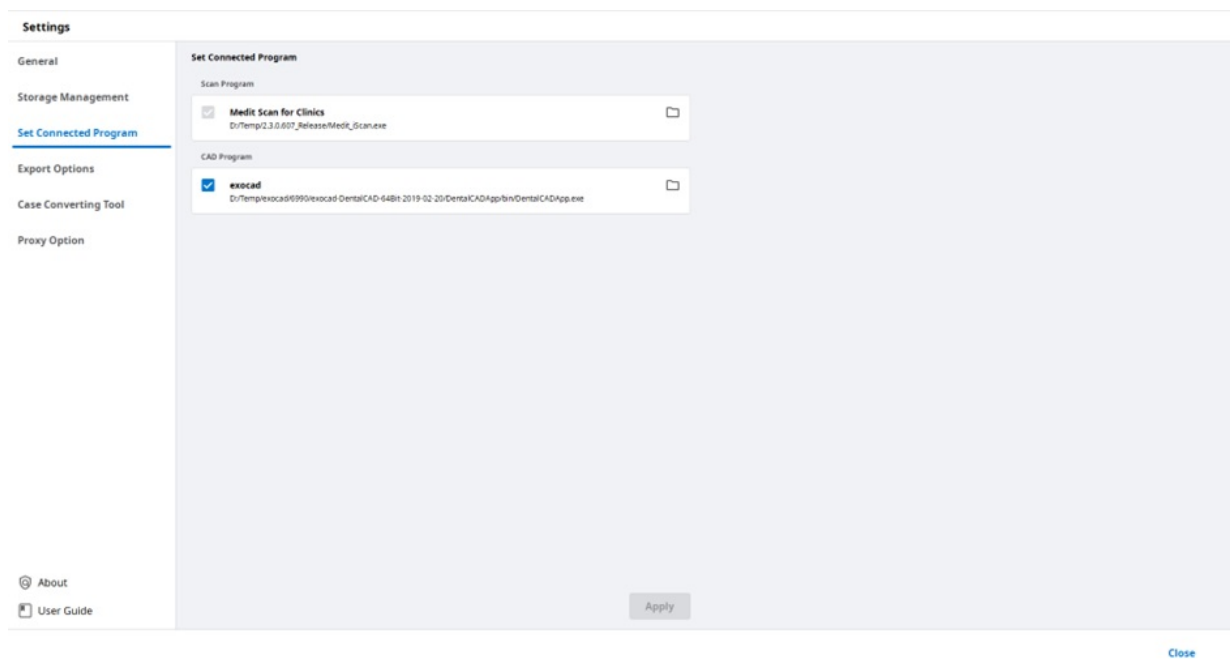

Sie können die folgenden Programme verbinden:

	Praxis-Konto	Labor-Konto
Scan-Programm	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs.
CAD-Programm	exocad	exocad

iHinweis

Die Integration der folgenden Dienste ist für Medit Link für Mac nicht verfügbar.

- Medit Scan for Labs
- exocad

Export-Optionen

Legen Sie fest, wie die Dateien von Medit Link exportiert werden sollen.

Settings

General

Storage Management

Set Connected Program

Export Options

Case Converting Tool

Proxy Option

Export Options

CAD Type

Maestro

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ medidMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

Compress & Combine

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh

Options when same folder or file already exists.

☒ Always ask when exporting
☐ Export a new file and overwrites the existing file. The file currently stored will be lost.
☐ Create a folder and export the files

Rule for Folder Name

Creation Date

Scanning Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

Folder Name

Case Name

Rule for File Name

Creation Date

Scanning Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Partner Name

Patient ID

Order ID

File Name

Case Name

Apply

About

User Guide

Close


CAD-Typ	Wählen Sie das CAD-Programm, das Sie für den Entwurf benutzen möchten. Das Programm passt die Ergebnisse auf der Grundlage Ihrer Auswahl an, so dass Sie mit dem Entwurf ohne zusätzliche Achsenausrichtung fortfahren können.
Dateien exportieren nach	Geben Sie den Pfad an, in dem Sie die Ergebnisse speichern möchten.
Mesh-Format	Legen Sie das Format der endgültigen Netzdatei fest.
Bildformat	Legen Sie das Format der exportierten Bilddateien fest.
Komprimieren & Kombinieren	Dateien komprimieren: Komprimieren Sie alle Ergebnisse in eine einzige Datei. Einzelne Mesh kombinieren: Kombinieren Sie alle Ergebnisse für den Oberkiefer oder Unterkiefer in einer Datei. Wenn Sie einige Programme benutzen, die nicht mehrere Dateien importieren und bearbeiten können, können Sie diese zu einer einzigen Datei zusammenfassen, um in diesen Programmen arbeiten zu können.
Optionen, wenn derselbe Ordner oder dieselbe Datei bereits existiert.	Wählen Sie die Standardaktion für Fälle, in denen derselbe Ordner- oder Dateiname im Zielpfad existiert. • Beim Exportieren immer nachfragen. • Exportieren Sie eine neue Datei und überschreiben Sie die vorhandenen Dateien. Die aktuell gespeicherte Datei geht verloren. • Erstellen Sie einen Ordner und exportieren Sie die Dateien

	Definieren Sie Regeln für die Erstellung eines Ordernamens beim Exportieren von Dateien. Die festgelegten Regeln werden auf die Benennung von Ordnern angewandt und
--	---

Regel für Ordnername	Die exportierte Datei wird in dem erstellten Ordner gespeichert. Die unten stehenden Informationen können zum Festlegen der Regel benutzt werden. • Praxis-Konto Erstellungsdatum des Falls, Scan-Datum, Bestelldatum, Patientenname, Fallname, Partnername, Patienten-ID, Bestell-ID • Labor-Konto Erstellungsdatum des Falls, Scan-Datum, Bestelldatum, Patientenname, Fallname, Partnername, Bestell-ID
Regel für Dateiname	Definieren Sie Regeln für den exportierten Dateinamen. Die untenstehenden Informationen können zum Festlegen der Regel benutzt werden. • Praxis-Konto Erstellungsdatum des Falls, Scan-Datum, Bestelldatum, Patientenname, Fallname, Partnername, Patienten-ID, Bestell-ID • Labor-Konto Erstellungsdatum des Falls, Scan-Datum, Bestelldatum, Patientenname, Fallname, Partnername, Bestell-ID


Werkzeug für Fallkonvertierung

Verschieben Sie Fälle zwischen verschiedenen Konten.

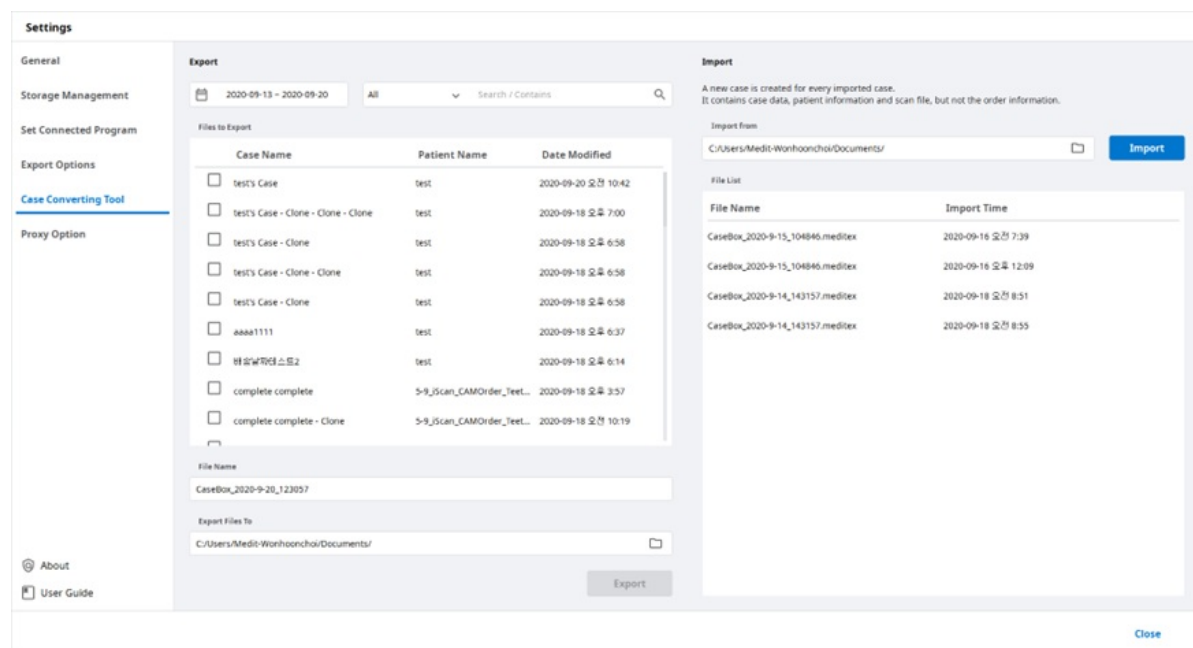

Wie Sie das Werkzeug für Fallkonvertierung benutzen

1. Öffnen Sie Medit Link und klicken Sie auf „Einstellungen“.

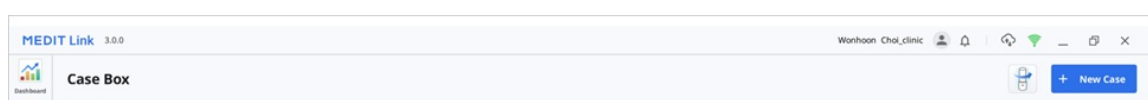

Total Count: 514

2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 시뮬한 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53
Scan Completed	test's Case	test	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay	2022-09-27 오전 8:44	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-26 오후 2:19	
Ordered	test's Case - Clone	test	14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-Inlay	2022-09-22 오전 7:03	2022-09-14 오전 8:12
Scan Completed	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37
Ordered	test's Case - Clone	test	23-Crown / 24-Crown / 25-Crown / 26-Crown	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-19 오후 3:37

2. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite den Abschnitt „Werkzeug für Fallkonvertierung“.

Settings

General
Storage Management
Set Connected Program
Export Options
Case Converting Tool
Proxy Option

Export

2020-09-13 ~ 2020-09-20 All Search / Contains

Files to Export

Case Name	Patient Name	Date Modified
☐ test's Case	test	2020-09-20 오전 10:42
☐ test's Case - Clone - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 7:00
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ aaaa1111	test	2020-09-18 오후 6:37
☐ 1111111111	test	2020-09-18 오후 6:14
☐ complete complete	>9_Scan_CAMOrder_Test...	2020-09-18 오후 3:57
☐ complete complete - Clone	>9_Scan_CAMOrder_Test...	2020-09-18 오전 10:19

File Name
CaseBox_2020-9-20_123057

Export Files To
C:\Users\Medic\Worhoochoi\Documents\

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information and scan file, but not the order information.

Import from
C:\Users\Medic\Worhoochoi\Documents\ Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오전 7:39
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오후 12:09
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오전 8:51
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오전 8:55

Export

Close

3. Klicken Sie im Abschnitt Importieren auf das Ordnersymbol, um Ihren PC nach der .meditex-Datei zu durchsuchen, die Sie importieren möchten.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Importieren“ und überprüfen Sie die importierte Datei in der Dateiliste unten.

Settings

General
Storage Management

Export

2020-09-13 ~ 2020-09-20 All Search / Contains

Import

A new case is created for every imported case.
It contains case data, patient information and scan file, but not the order information.

2

Set Connected Program
Export Options
Case Converting Tool
Proxy Option

About
User Guide

Files to Export

Case Name	Patient Name	Date Modified
☐ test's Case	test	2020-09-20 오전 10:42
☐ test's Case - Clone - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 7:00
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ test's Case - Clone	test	2020-09-18 오후 6:58
☐ aaaa1111	test	2020-09-18 오후 6:37
☐ 배송날짜테스트2	test	2020-09-18 오후 6:14
☐ complete complete	5-9_Scan_CAMOrder_Test...	2020-09-18 오후 3:57
☐ complete complete - Clone	5-9_Scan_CAMOrder_Test...	2020-09-18 오전 10:19

File Name
CaseBox_2020-9-20_123057

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/

Export

Import from
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Documents/

1

Import

File List

File Name	Import Time
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오전 7:39
CaseBox_2020-9-15_104846.meditex	2020-09-16 오후 12:09
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오전 8:51
CaseBox_2020-9-14_143157.meditex	2020-09-18 오전 8:55

Close

5. Der importierte Fall wird auch in Ihrer Case Box (Praxis-Konto) oder Work Box (Labor-Konto) angezeigt.

Proxy-Optionen

In einigen begrenzten Netzwerkumgebungen können Sie die Netzwerkeinstellungen ändern.

Settings
General
Storage Management
Set Connected Program
Export Options
Case Converting Tool
Proxy Option

About
User Guide

Proxy Server ☒

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

☐ HTTP
☒ HTTPS

Proxy Server Username (Optional)

Proxy Server Password (Optional)

Please apply the changes.

Apply

Close

Über

Detaillierte Informationen über Medit Link anzeigen.

About



Benutzerhandbuch

Holen Sie sich das Benutzerhandbuch für Medit Link.

Zum Öffnen des Benutzerhandbuch ist eine Internetverbindung erforderlich.

Der Datei-Viewer gruppiert und zeigt verschiedene Daten an, einschließlich der Daten, die von mit Medit Link verknüpften Programmen erfasst wurden, und der von Benutzern angehängten Daten.


Er bietet grundlegende Verwaltungsfunktionen wie das Ein- und Ausblenden von Daten, die Anpassung der Opazität und das Löschen von Daten.

Es unterstützt die Vorschau von Dateien in den folgenden Formaten:

- 3D-Daten: STL, OBJ, PLY
- 2D-Bilder: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Video Datei: MKV, MP4, AVI, WMV

Datenbaum

Sie können alle Daten für den Fall im Datenbaum gruppieren und anzeigen. Außerdem können Sie Daten einblenden/ausblenden, die Transparenz anpassen und Daten aus dem Datenbaum löschen.

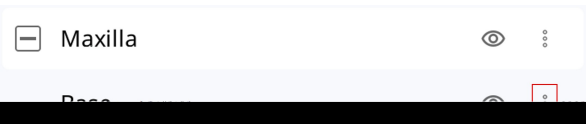	Einblenden/Ausblenden	Sie können die Daten einblenden oder ausblenden.
	Opazität	Der Schieberegler erscheint, wenn Sie auf eine der Daten im Datenbaum klicken. Sie können die Opazität der angezeigten Daten anpassen, indem Sie den Schieberegler verschieben. 
	Mehr	Wenn Sie auf das Symbol Mehr klicken, werden weitere verfügbare Funktionen angezeigt.  • Nur Auswahl anzeigen: Blenden Sie alle anderen Daten aus und zeigen Sie nur die entsprechenden Daten an. • Ausblenden: Blendet die Daten aus. • Duplizieren: Kopieren Sie die Daten und fügen Sie sie der Anhangsgruppe hinzu. • Exportieren: Exportieren Sie die ausgewählten Dateien. • Umbenennen: Ändern Sie den Namen der Daten. • Löschen: Löschen der Daten.





Hinweis

Sie können Daten umbenennen, wenn Sie online sind.

Werkzeuge zur Modellsteuerung

3D-Modell-Steuerung

	Schwenken	Verschieben Sie das Modell.
	Rotieren	Rotieren Sie das Modell.

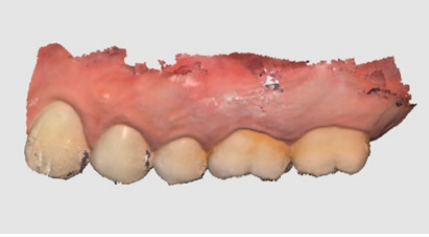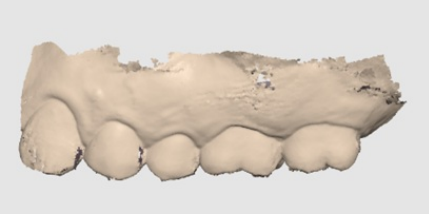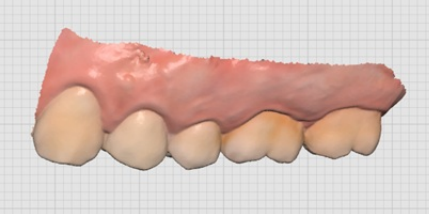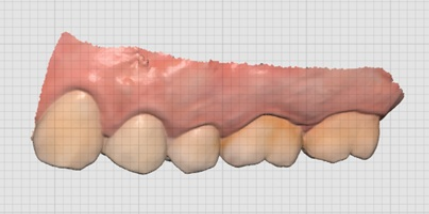	Vergrößern/Verkleinern	Rein / Raus-zoomen des Modells.
	Zoom anpassen	Platzieren Sie das Modell in der Mitte des Bildschirms.
	Modell- Anzeigemodus	Textur ein
		Daten in echten Texturfarben anzeigen. 
		Textur aus
		Daten in einer einzigen Farbe anzeigen. 
	Raster- Einstellungen (mm)	Raster ein
		Zeigt das Raster im Hintergrund an. 
		Überlagern ein
		Überlagern Sie das Raster über dem Modell. 
		Raster aus
		Das Raster ausblenden.

2D-Bild-Steuerung

	Weiter/Vorherige Bild	Verschieben Sie zwischen Bildern.
	Bearbeiten	Bearbeiten Sie das Bild.
 	Fenster einklemmen/einfügen	Sie können das Bildfenster abtrennen und an die gewünschte Position verschieben. Sie können die Fenstergröße ändern. Wenn das Fenster wieder an seine ursprüngliche Position gebracht wird, nimmt es seine Standardgröße wieder an.


Funktion Werkzeuge

Bilderfassung und Notiz

Erfassen Sie den aktuellen Bildschirm als 2D Bild, zeichnen Sie darauf oder fügen Sie Notizen hinzu.


Erfassen Sie den aktuellen Bildschirm als 2D-Bild, zeichnen Sie darauf oder fügen Sie Notizen hinzu.

Sie können es als Datei mit Ihren Notizen speichern und als Referenz versenden.

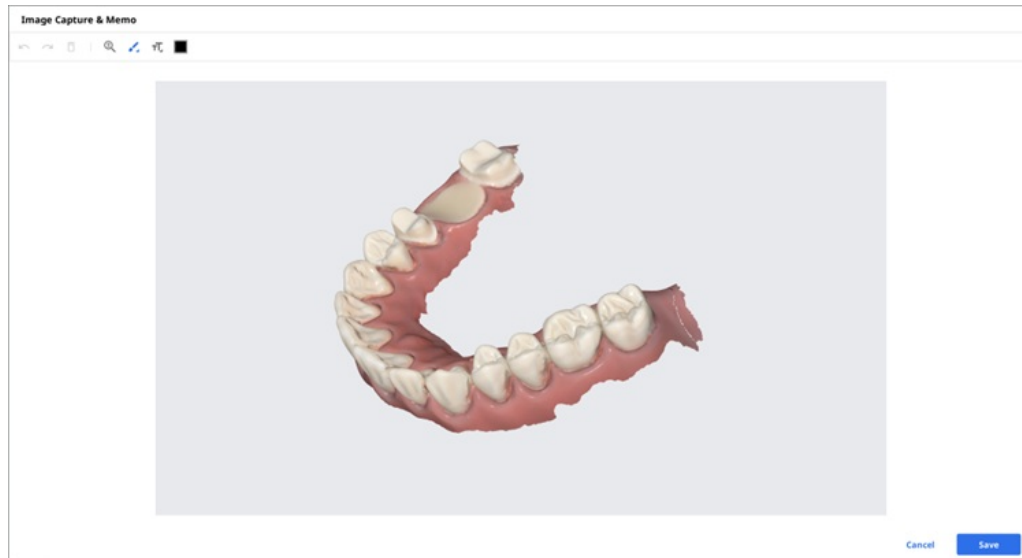


Kieferorthopädische Erfassung

Erfasst die Bilder in der aktuellen Blickrichtung sowie oben/unten/links/rechts von der aktuellen Blickrichtung.

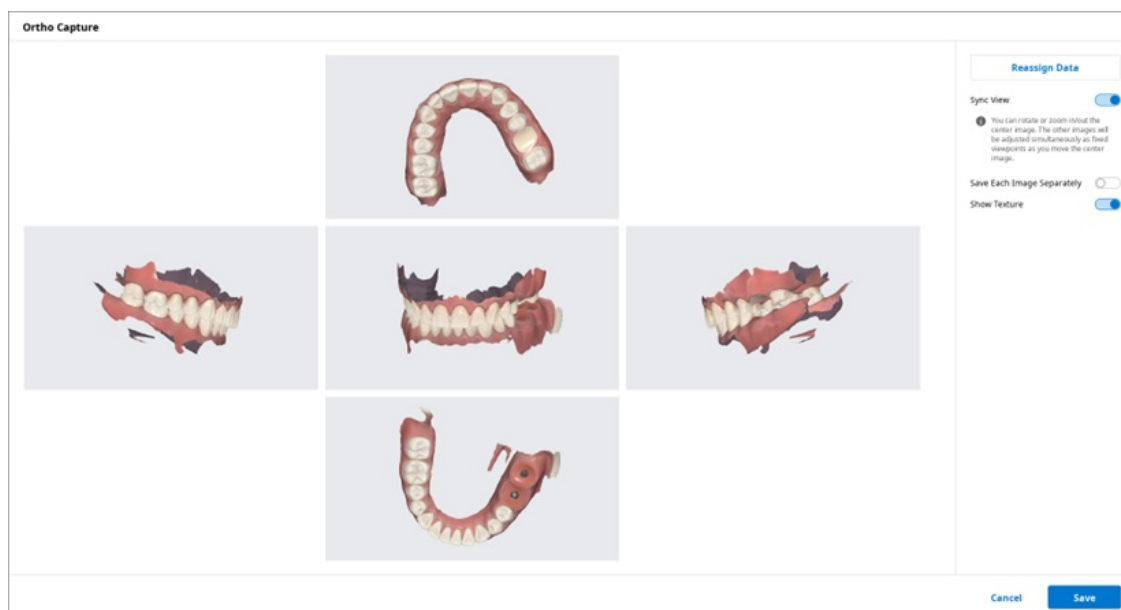

Ansicht synchronisieren	Wenn eingeschaltet, können Sie das mittlere Bild rotieren oder vergrößern/verkleinern. Die anderen Bilder werden gleichzeitig als feste Standpunkte angepasst, wenn Sie das mittlere Bild verschieben. Wenn ausgeschaltet, können Sie alle Bilder einzeln schwenken, rotieren oder vergrößern/verkleinern.
Jedes Bild separat speichern	Speichern Sie jedes Bild in einer hohen Auflösung.
Textur anzeigen	Schalten Sie die Textur für das Modell ein/aus.
	Ändern Sie die Daten für Oberkiefer / Unterkiefer mit der Funktion Daten neu zuordnen. Sie können die geänderten Daten benutzen, um die Ergebnisbilder von Kieferorthopädische Erfassung zu erstellen und zu benutzen.


Daten neu zuordnen

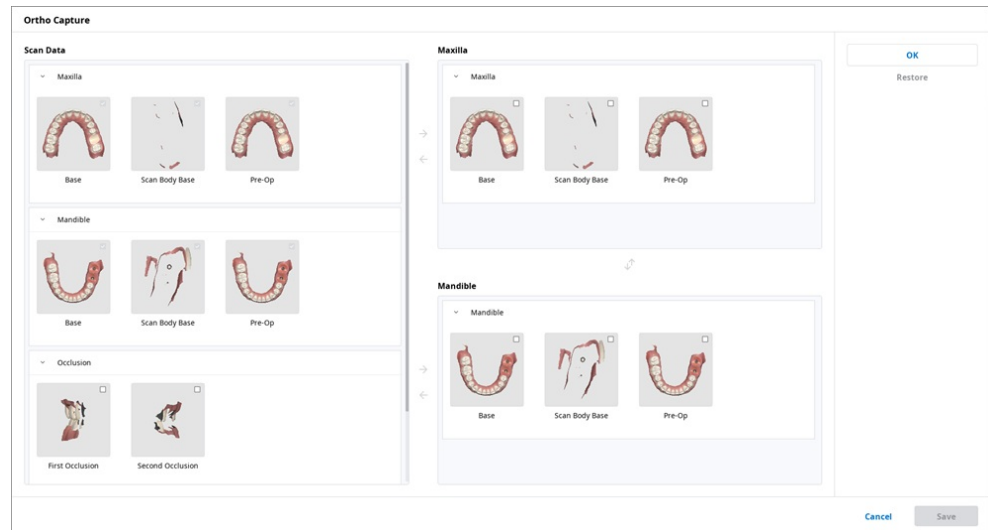

- Scandaten: Es werden alle Scandaten für den Fall angezeigt.
- Oberkiefer: Die Daten, die Sie für den Oberkiefer ausgewählt haben, werden angezeigt.
- Unterkiefer: Die Daten, die Sie für den Unterkiefer ausgewählt haben, werden angezeigt.

Löcher auffüllen


Löcher auffüllen in 3D-Mesh-Daten.

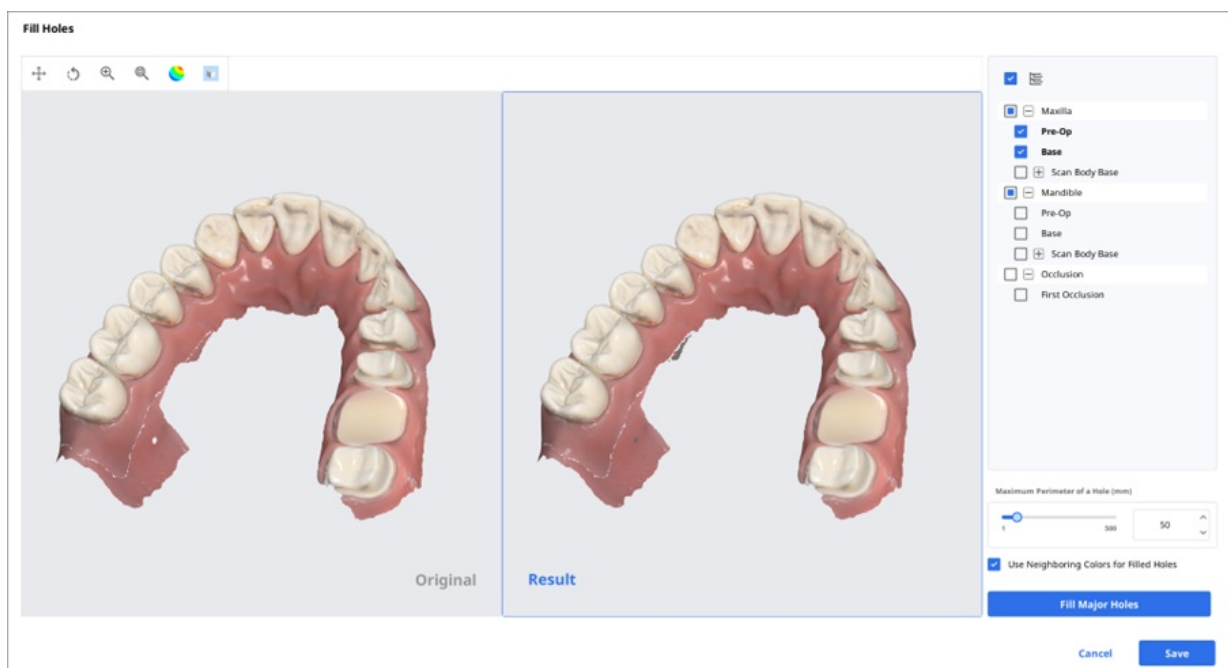

Trimmen

Trimmen bietet verschiedene Werkzeuge zum Bearbeiten von Daten.



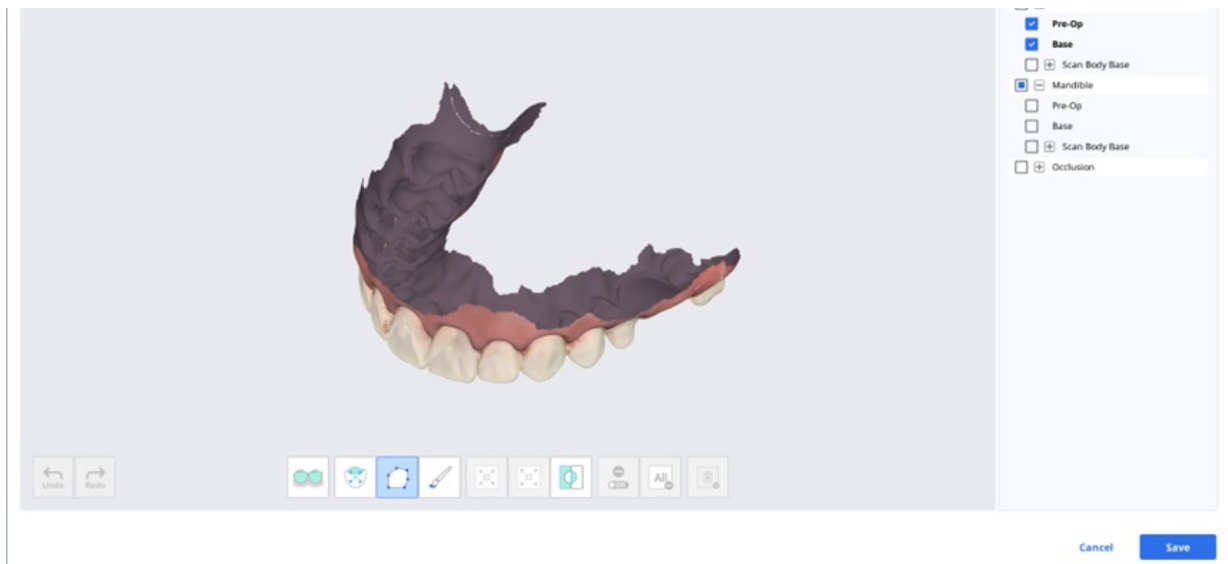


Die ausgewählten 3D-Mesh-Daten können mit verschiedenen Werkzeugen am unteren Rand des Fensters bearbeitet werden.

Auswahl		Intelligente Zahnauswahl	Wählt automatisch alle Zähne des Kiefer aus, wobei das Gingiva ausgespart wird. Hinweis Diese Funktion ist nur für Scandaten verfügbar, die mit Medit Scan for Clinics bei aktivierter Option „GPU benutzen“ erfasst wurden.
		Intelligente Einzelzahnauswahl	Wählen Sie automatisch den Bereich eines einzelnen Zahns aus und lassen Sie dabei Teile der Gingiva aus. Klicken, drücken und ziehen Sie die Maus auf den Zahn.
		Polyline auswählen	Wählen Sie alle Elemente innerhalb einer auf dem Bildschirm gezeichneten Polylinienform aus.
		Pinselauswahl	Wählen Sie alle Elemente auf einem frei handgezeichneten Pfad auf dem Bildschirm aus. Es wird nur die Vorderseite ausgewählt. Der Pinsel ist in drei verschiedenen Größen verfügbar.
Anpassung des ausgewählten Bereichs		Ausgewählten Bereich verkleinern	Reduziert den ausgewählten Bereich mit jedem Drücken der Taste.
		Ausgewählten Bereich erweitern	Erweitert den ausgewählten Bereich mit jedem Drücken der Taste.
		Auswahlbereich umkehren	Kehrt die Auswahl um.
Abwahl		Auswahl/Abwahl	Wenn eingeschaltet, heben Sie die Auswahl des Bereichs auf, indem Sie verschiedene Werkzeuge benutzen.
		Gesamte Auswahl aufheben	Löschen Sie alle ausgewählten Bereiche.
		Ausgewählten Bereich löschen	Löschen Sie die Daten aus dem ausgewählten Bereich.

1. Wählen Sie den Bereich, den Sie zuschneiden möchten, mit den Bereich Auswahl-Werkzeuge aus.



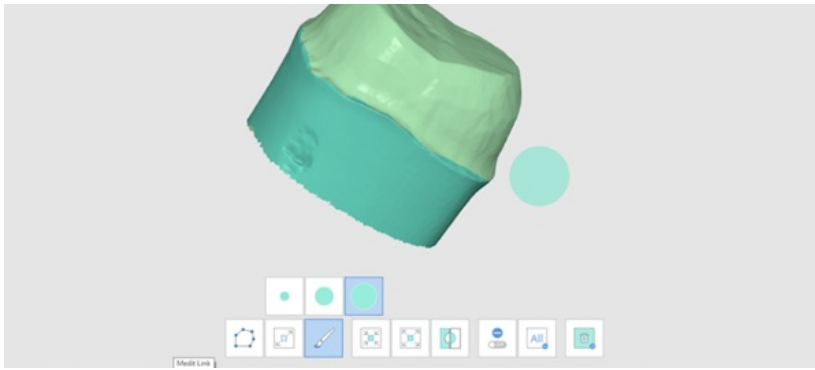


2. **Hinweis**


Das Polylinien-Trimmen Werkzeug wählt alle Elemente innerhalb einer auf dem Bildschirm gezeichneten Polylinienform aus, während das Pinsel-Trimmen Werkzeug nur die vorderen Gesichtsdaten auswählt.

3. Mit den folgenden drei Werkzeugen können Sie die Auswahl invertieren, verkleinern oder erweitern.

- Auswahlbereich umkehren

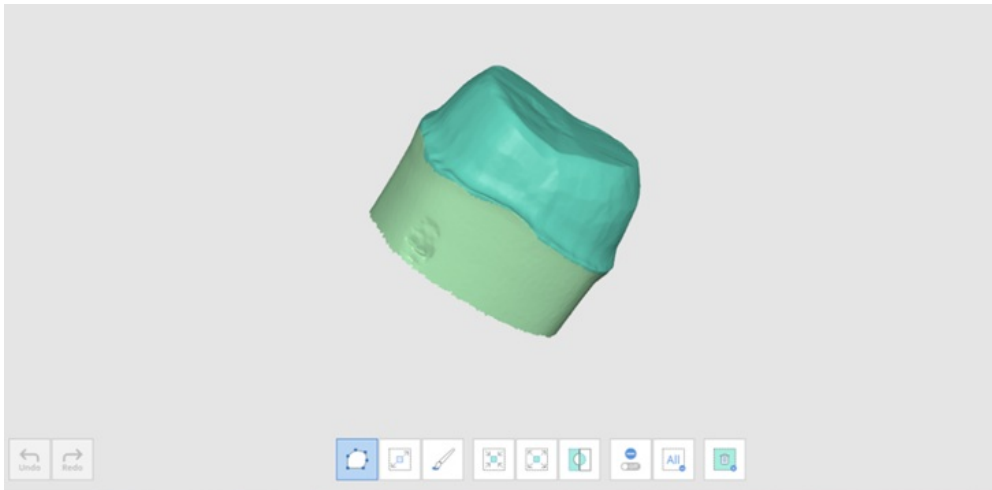


- Ausgewählten Bereich verkleinern

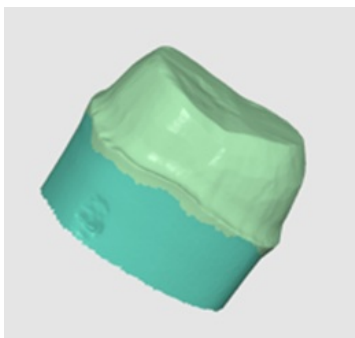

- Ausgewählten Bereich erweitern




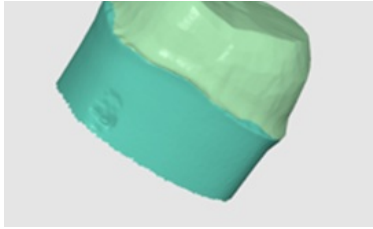


4. Mit dem Werkzeug Ausgewählten Bereich löschen können Sie die Auswahl der ausgewählten Bereiche aufheben.

Okklusionsausrichtung optimieren

Die Okklusionsausrichtung optimieren. Sie können die Zieldaten auswählen und die Okklusionsausrichtung anpassen.

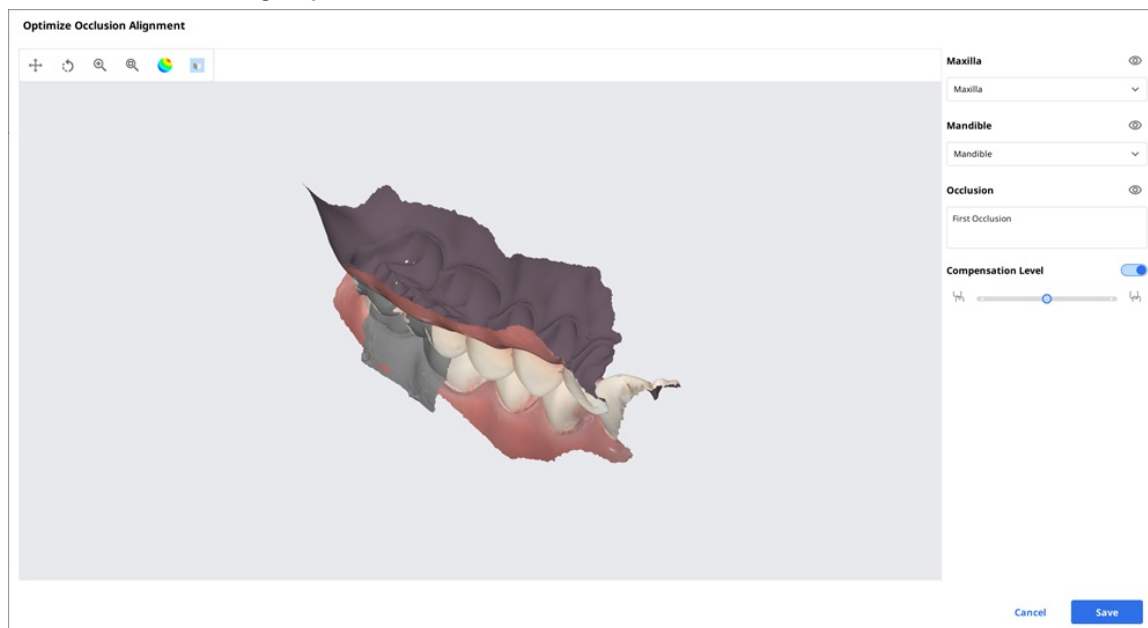


Ausgleichsniveau

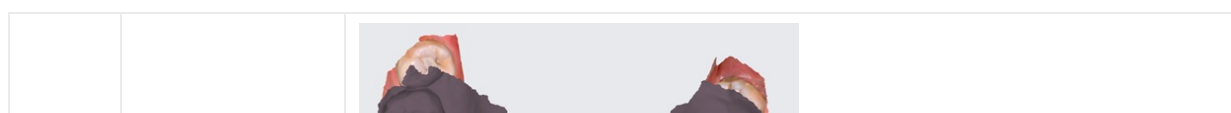

Mittel	Compensation Level ☒	
Hoch	Compensation Level ☒	
Aus	Compensation Level ☐	

Unterkieferbewegung

Sie können die in Medit Scan for Clinics aufgezeichneten Unterkieferbewegungen abspielen, um die dynamischen okklusalen Kontakte zwischen dem oberen und unteren Gebiss zu sehen.

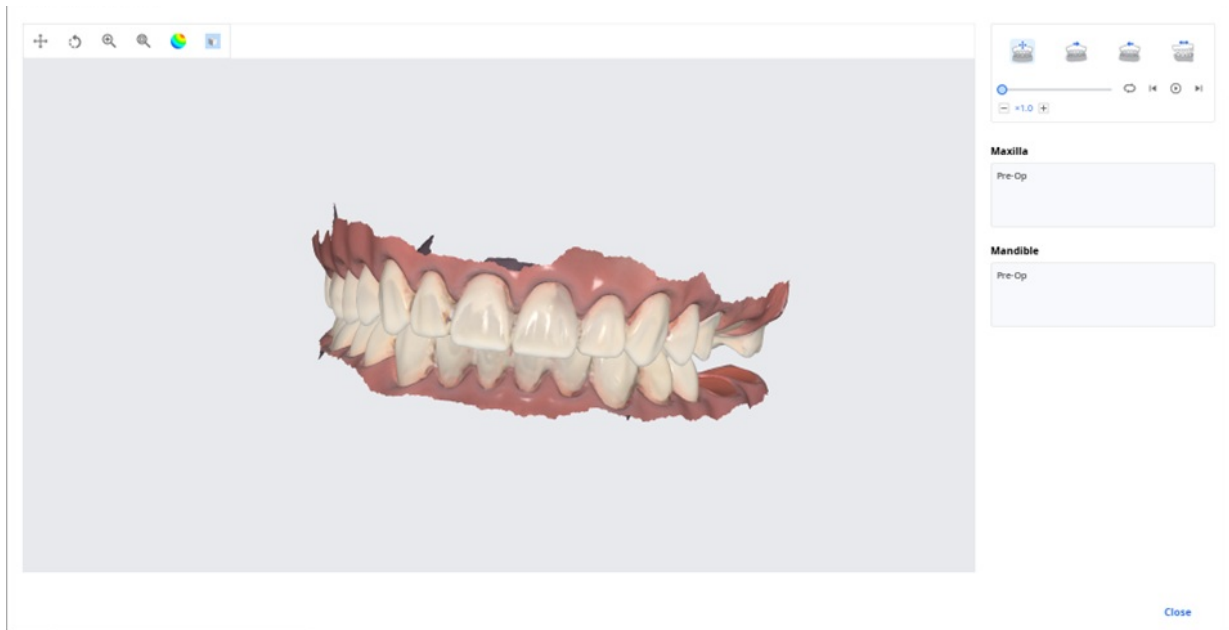

	Freie Bewegung	Spielen Sie die Aufnahme der freie Unterkieferbewegung ab.
	Linke seitliche Bewegung	Spielen Sie die Aufnahme des Unterkiefers ab, der sich nach links verschiebt.
	Rechte seitliche Bewegung	Spielen Sie die Aufnahme des Unterkiefers ab, der sich nach rechts verschiebt.
	Protrusivbewegung	Spielen Sie die Aufnahme des Unterkiefers ab, der sich vorwärts verschiebt.

Verwalten der Mehrfache Okklusionsdaten im Datei-Viewer

Sie können mehrere Ergebnisse von Okklusionsdaten aus der Medit Scan-Anwendung abrufen.

Medit Link bietet die Funktion zur Verwaltung der Ergebnisse über den „Datei-Viewer“.

Wie man mehrere Ergebnisse verwalten kann


Wenn der Benutzer mehrere Okklusionsergebnisse von Medit Scan for Clinics erhält, bietet Medit Link die Möglichkeit, ein Ergebnis auszuwählen.


Die Liste der Ergebnisse wird nach Namen aufgelistet, und Sie können ein Element auswählen.

Das ausgewählte Modell wird im „Datenbaum“ und im „Modell-Anzeigebereich“ angezeigt.



Sie können die Liste einklappen und das Element mithilfe der Pfeilsymbole ändern.

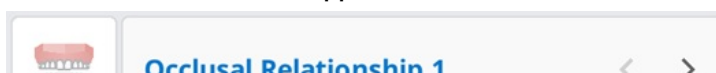

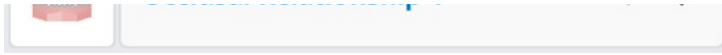

Sie können die Ansichtsoptionen ändern, um das Layout der Fall-Liste in der Case Box/Work Box/In Box/Order Box anzupassen.

View Options

 Status Filters	6 in use >
 Table Items	6 in use >
 View Type	List View >
 Grouping	None >
 Sorting	Last Modified Date >

Status-Filtern

Anzeigen oder Ausblenden jedes Filters, der den Status des Falls darstellt. Die versteckten Status-Filtern werden auf dem Bildschirm in der Case Box/Work Box/In Box/Order Box nicht angezeigt.

Mit den angezeigten Filtern können Sie den gewünschten Fall leicht finden.

View Options

< **Status Filters**

↺

Shown

Hide All

Form Only



Need Processing



Scan Completed



Hidden

Show All

CAD



Ordered




Case Completed



Cancel

Apply

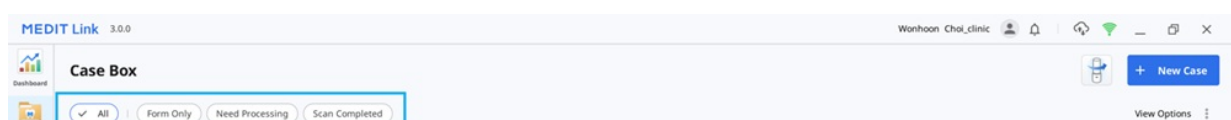

Case Box		Total Count: 514	2018-01-01-2022-09-29		All	▼ All / Contains	Q
Order Box		Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	↓ Scanning Date
Case Talk		Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
App Box		Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Trash Box		Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
		Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
		Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
		Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27

- Sie können auf den Status klicken, den Sie anzeigen möchten, um nur Fälle in diesem Status anzuzeigen.
- Sie können mehrere Status auf einmal auswählen.

Verfügbar Filtern Optionen für jedes Feld:

Case Box	Alle/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Order Box	Alle/Pending/Storniert/Abgelehnt/Akzeptiert/Shipped/Case Completed
In Box	Alle/Pending/Storniert/Abgelehnt/Akzeptiert/Bereit/Shipped/Case Completed
Work Box	Alle/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done
Trash Box	Nicht unterstützt

Tabellenelemente

Wählen Sie die Elemente aus, die in der Fall-Liste in der Case Box/Work Box/In Box/Order Box angezeigt werden sollen. Sie können die Reihenfolge der Tabellenelemente ändern oder die Breite der Tabellenspalten in der Listenansicht anpassen, um sie optimal an die Benutzerumgebung anzupassen.

View Options

Table Items

Shown Hide All

:: Status	
:: Case Name	
:: Patient Name	
:: Form Information	
:: Last Modified Date	
:: Scanning Date	

Hidden Show All

:: Birth Date	
:: Order Date	
:: Lab Name	

Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box

View Options

Total Count: 514 2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오전 8:45	
Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오전 8:13	2022-09-29 오전 7:56
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오전 10:41	
Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오전 9:27	
Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오전 9:27
Scan Completed	Preop 사용된 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

Ansicht Typ

Ändern Sie den Ansicht Typ zwischen der Galerie-Ansicht und der Listenansicht auf der Case Box.

Galerie-Ansicht

MEDIT Link 3.0.2 Wonhoon Choi_clinic

Medit Link2.3.0 Release

1

Medit Link 2.3.0

2

2020-09-24



Implant Crown

Zirconia

11, 12, 13, 14,...



Inlay

Zirconia

3, 4, 5, 6, 7



Crown

Metal

18, 19, 20, 21,...

+

1

2020-09-14 오전 7:43

4

5

Scan Completed

Listenansicht

MEDIT Link 3.0.2

Wanhoo Choi_clinic



Case Box							
Dashboard Case Box Order Box Case Talk App Box Trash Box ✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed View Options							
Total Count: 644		2018-01-01~2022-10-28		All		All / Contains	
Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Lab Name	
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-28 오전 7:32			
Scan Completed	temporaries - Clone - Clone - Clone	test	25-Crown / 26-Pontic / 27-Crown	2022-10-27 오후 9:29			
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:45			
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:39			
Scan Completed	test's Case	test	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay	2022-10-27 오후 8:31			
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 8:30			
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 7:33			
Form Only	test's Case	test	-	2022-10-27 오후 7:07			
Ordered	test's Case	test	13-Onlay / 14-Onlay / 15-Onlay	2022-10-27 오후 3:50		Wonhoonchol-Lab	
Scan Completed	케이스배모있고주문배모수정환케이스 - Clone	test	14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay	2022-10-27 오전 11:28	2021-12-03 오후 2:37		
Scan Completed	파일리스트테스트12 - Clone	tst	13-Inlay / 14-Inlay / 15-Inlay / 16-Inlay / 17-In...	2022-10-27 오전 10:53	2022-10-11 오후 8:12		
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-27 오전 9:10			
Scan Completed	test's Case	test	-	2022-10-27 오전 8:59	2022-10-27 오전 8:54		

Gruppierung

Wählen Sie eine Gruppierungsoption, um die Fälle in der Liste nach der gewählten Option zu klassifizieren und neu anzuordnen.

View Options

Status Filters 3 in use >

Table Items 6 in use >

View Type List View >

Grouping None ▾

- ☒ None
- ☐ Patient Name
- ☐ Order Date
- ☐ Scanning Date

Sorting Last Modified Date >

Für jede Box sind die folgenden Gruppierungsoptionen verfügbar:

Box	Gruppierung
Case Box	Kein
	Patientenname
	Scan-Datum
	Bestelldatum
Order Box	Kein
	Scan-Datum
	Bestelldatum
	Angefragtes Lieferdatum
In Box	Kein
	Bestelldatum
	Angefragtes Lieferdatum

	Angerregtes Lieferdatum
Work Box	Kein
	Angefragtes Lieferdatum

Hinweis

Die Optionen Gruppierung und Sortierung sind für die Trash Box und Case Talk nicht verfügbar.

Sortierung

Wählen Sie eine Sortierungsoptionen aus, um die Reihenfolge der Fälle in der Liste entsprechend der gewählten Option zu ändern.

View Options

Status Filters 3 in use >

Table Items 6 in use >

View Type List View >

Grouping None >

Sorting Last Modified Date ▾

☐ Patient Name
☒ Last Modified Date
☐ Scanning Date
☐ Order Date
☐ Lab Name

Für jede Box sind die folgenden Sortierungsoptionen verfügbar:

Box	Gruppierung	Sortierung
Case Box	Kein	Patientenname / Geänderte Datum / Scan-Datum/ Bestelldatum / Laborname
	Patientenname	Geänderte Datum / Scannen Datum/ Bestelldatum / Laborname
	Scan-Datum	Patientenname / Geänderte Datum / Bestelldatum / Laborname
	Bestelldatum	Patientenname / Geänderte Datum / Scan-Datum/ Laborname
Order Box	Kein	Patientenname / Scan-Datum / Bestelldatum/ Angefragtes Lieferdatum / Laborname
	Scan-Datum	Patientenname / Bestelldatum/ Angefragtes Lieferdatum / Laborname
	Bestelldatum	Patientenname / Scan-Datum / Angefragtes Lieferdatum / Laborname
	Angefragtes Lieferdatum	Patientenname / Scan-Datum / Bestelldatum / Laborname
		Patientenname / Bestelldatum/ Angefragtes Lieferdatum /

In Box	kein	Praxisname
	Bestelldatum	Patientenname / Scan-Datum / Angefragtes Lieferdatum / Praxisname
	Angefragtes Lieferdatum	Patientenname / Bestelldatum / Praxisname
Work Box	Kein	Patientenname / Geänderte Datum/ Angefragtes Lieferdatum / Praxisname
	Angefragtes Lieferdatum	Patientenname/ Geänderte Datum / Praxisname

iHinweis

Die Optionen Gruppierung und Sortierung sind für die Trash Box und Case Talk nicht verfügbar.


Filtern nach Datum

Filtern und Anzeigen der Fälle, die innerhalb des festgelegten Zeitraums zuletzt bearbeitet wurden.

1. Klicken Sie auf den Zeitraumfilter.



2. Wählen Sie die Dauer aus der Liste.

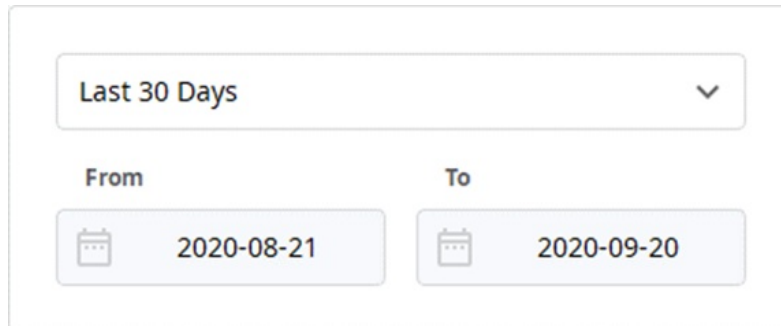

- Alle: Zeigt alle Fälle an.
- Benutzerdefinierter Bereich: Geben Sie das Beginnen- und Enddatum an, um die Fälle anzuzeigen, die innerhalb dieses Zeitraums zuletzt bearbeitet wurden.
- Heute: Zeigt Fälle an, die heute zuletzt bearbeitet wurden.
- Gestern: Zeigt Fälle an, die gestern zuletzt bearbeitet wurden.
- Letzte 7 Tage: Zeigt die Fälle an, die in den letzten 7 Tagen (außer heute) zuletzt bearbeitet wurden.
- Letzte 30 Tage: Zeigt die Fälle an, die in den letzten 30 Tagen (außer heute) zuletzt bearbeitet wurden.
- Dieses Monat: Zeigt die Fälle an, die in diesem Monat zuletzt bearbeitet wurden.
- Vorheriges Monat: Zeigt die Fälle an, die im letzten Monat bearbeitet wurden.

Die Fall-Liste wird in Echtzeit mit den Fällen aktualisiert, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums erstellt oder zuletzt bearbeitet wurden.

Erweiterte Suchfunktionen


Nutzen Sie die Suchfunktionen, um schnell die gewünschten Informationen zu finden.



Die folgenden Suchkriterien sind für jedes Feld verfügbar:

Case Box	Alle, Fallname, Patientename, Patienten-ID, Formularinformationen, Laborname
Order Box	Alle, Fallname, Patientename, Patienten-ID, Laborname, Bestell-ID
In Box	Alle, Fallname, Patientename, Praxisname, Bestell-ID
Work Box	Alle, Fallname, Patientename, Formularinformationen, Praxisname, Bestell-ID
Case Talk	Case Talk Name (Enthält), Patientename (Entspricht)
Trash Box (Praxis)	Alle, Fallname, Patientename, Laborname, Bestell-ID, Gelöscht von
Trash Box (Labor)	Alle, Fallname, Patientename, Praxisname, Bestell-ID, Gelöscht von

Sie können die Suchkriterien auswählen und zwischen der Logik „Enthält“ und „Entspricht“ wählen.

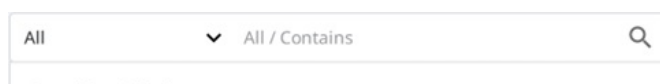

Searching Criteria

- ☒ All
- ☐ Case Name
- ☐ Patient Name
- ☐ Patient ID
- ☐ Form Information
- ☐ Lab Name

-
- ☒ Contains
 - ☐ Equals

Fälle erstellen

Fälle erstellen in Case Box (Praxis)

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neuer Fall“ in der oberen rechten Ecke.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

2. Geben Sie grundlegende Informationen ein, z. B. den Namen des Patienten und den Fallname.
 - Wenn Sie einen Namen eingeben, der nicht in der Patientenliste enthalten ist, wird ein neuer Patient hinzugefügt.
 - Wenn Sie einen Namen eingeben, der in der Patientenliste enthalten ist, können Sie ihn aus der Liste auswählen.
 - Wenn Sie einen Fall für einen bestehenden Patienten anmelden, klicken Sie auf das Symbol Patientenliste, um einen bestehenden Patienten auszuwählen.



- Im Dialogfeld Patientenliste können Sie einen neuen Patienten anmelden oder die Informationen eines bestehenden Patienten bearbeiten.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains

+ New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-09-28	2020-09-28	
☐	test				0	2020-09-28	2020-09-28	
☐	test				13	2020-09-23	2020-09-28	
☒	test				85	2020-09-23	2020-05-08	
☐	Worhoun Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-09-18		
☐	13				0	2020-09-20		
☐	14				0	2020-09-20		
☐	15				0	2020-09-20		

[Close](#) [Select](#)

3. Der Fallname wird automatisch ausgefüllt, Sie können ihn aber noch ändern.
4. Klicken Sie auf „Anmelden & Scannen“, um die Registrierung des Falls abzuschließen und mit dem Scannen fortzufahren.
 - **Anmelden:** Sie werden zur Hauptseite weitergeleitet. Dies ist nützlich, wenn Sie mehrere Fälle anmelden.
 - **Anmelden & Scannen:** Verschieben Sie auf die Tab „Formular“, um die Formularinformationen für den Fall zu anmelden.

Fälle erstellen in Work Box (Labor)

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neuer Fall“ in der oberen rechten Ecke.

The form is titled "New Case Information" and contains the following fields and elements:

- Clinic Name***: A dropdown menu.
- Patient Name***: A text input field.
- Case Name***: A text input field.
- Requested Delivery Date**: A date picker showing "2023-04-13".
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- Buttons**: "Cancel" and "Register".

2. Geben Sie den Praxisname ein oder wählen Sie ihn aus.
3. Geben Sie den Namen des Patienten und den Fallname ein. Der Fallname wird automatisch ausgefüllt, Sie können ihn aber noch ändern.
4. Geben Sie das erwartete Lieferdatum unter Berücksichtigung des Fertigstellungsdatums der Arbeit ein.
5. Nachdem Sie den Fall angemeldet haben, werden Sie zur Hauptseite zurückgeleitet.

Fälle bearbeiten

Fälle bearbeiten in Case Box (Praxis)

1. Klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ neben dem Fallname.

The form is titled "Edit Case Information" and contains the following fields and elements:

- Patient Name***: A text input field with a search icon on the right.
- Test Occlusion**: A dropdown menu showing "Test Occlusion".
- Case Name***: A text input field showing "mandibular movement - Clone - Clone".
- Information**: A note stating "Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order."
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- Buttons**: "Cancel" and "Apply".
- Link**: "Terms & Conditions".

2. Klicken Sie auf das Symbol „Suche“, um den Namen des Patienten zu ändern. Beachten Sie, dass er nicht direkt bearbeitet werden kann; stattdessen können Sie einen Patientennamen suchen, durch den Sie den aktuellen ersetzen möchten, und die Patienteninformation in der Liste bearbeiten.

Dear Doctor,

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-09-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

- Überprüfen Sie den Namen des Patienten an, durch den Sie den aktuellen ersetzen möchten.
- Um einen neuen Patienten anzulegen, drücken Sie die Taste „Neuer Patient“.
- Benutzen Sie die Schaltfläche „Bearbeiten“, um die registriert Informationen über den Patienten zu ändern.
- Klicken Sie auf „Anwenden“, um den Vorgang abzuschließen.

Fälle bearbeiten in Work Box (Labor)

- Klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ neben dem Fallname.

Edit Case Information

Clinic Name*

test

Patient Name*

test

Case Name*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

- Klicken Sie auf „Anwenden“, nachdem die Bearbeitung abgeschlossen ist.

Hinweis

Sie können die Informationen der Fälle, die Sie über die Bestellung in In Box erhalten haben, nicht bearbeiten.


Fälle klonen

Fälle klonen in Case Box (Praxis)

- Klicken Sie auf das Symbol „Klonen“ am unteren Rand.



- Sie werden gefragt, welche Art von Informationen Sie in den neuen Fall klonen möchten.

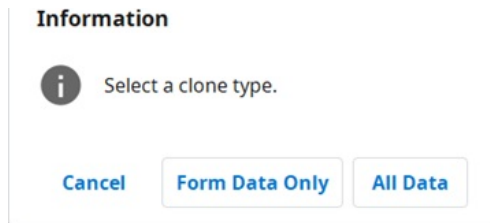

Information

 Select a clone type.

[Cancel](#) [Form Data Only](#) [All Data](#)

3. Wählen Sie, ob nur die Formularinformationen oder alle Daten repliziert werden sollen.
4. Wenn das Klonen abgeschlossen ist, wird ein Fall mit dem Namen „[Fallname] – Klonen“ erstellt.

Fälle klonen in Work Box (Labor)

1. Klicken Sie auf das Symbol „Klonen“ am unteren Rand.



2. Duplizieren Sie alle Daten, um einen neuen Fall zu erstellen.
3. Wenn das Klonen abgeschlossen ist, wird ein Fall mit dem Namen „[Fallname] – Klonen“ erstellt.


Fall löschen

Fall löschen (Praxis und Labor)

1. Klicken Sie auf das Symbol „Löschen“.



2. Klicken Sie auf „OK“, um den Fall zu löschen.

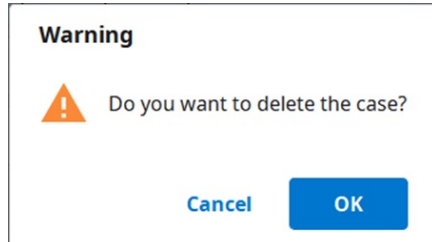

Warning

 Do you want to delete the case?

[Cancel](#) [OK](#)

3. Gelöschte Fälle werden in den Trash Box verschoben und können bei Bedarf wiederhergestellt werden.

Formularinformationen

Sie können die Formularinformationen auf der Grundlage des verbundenen Programms und der Behandlungsart eingeben.

Die von Ihnen eingegebenen Informationen werden als Basisinformationen für die Arbeit an Scan- oder CAD-Programmen und die Bestellung benutzt.

Anmelden von Formularinformationen in der Case Box

Eingabe auf der Tab Formular

1. Wählen Sie, ob Sie die Behandlungsinformationen nach Zähne oder nach Kiefer eingeben möchten.
2. Wählen Sie Typ - Methode - Material - Farbton.
 - Wenn Sie Informationen falsch eingegeben haben, gehen Sie zurück, um sie erneut auszuwählen.
 - Die ausgewählten Informationen werden automatisch in der Bestellliste registriert.
3. Klicken Sie auf „Speichern“ um Ihre Registrierung zu speichern.

Eingabe auf der Tab CAD

1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, die Ihre Scanstrategie festlegen: Zähne/Flexible Multi-Die/Multi-Die.
2. Wählen Sie die Zahnnummer/Kiefer/Matrizennummer.
3. Legen Sie die Einstellungen für detaillierte Optionen und CAD-Operationen fest.
4. Klicken Sie auf „OK“ um die Einstellungen zu speichern.
 - Die ausgewählten Informationen werden automatisch in der Bestellliste registriert.
5. Klicken Sie auf „Speichern“ um Ihre Registrierung zu speichern

Anmelden von Formularinformationen in der Work Box

Eingabe auf der Tab Formular

1. Wählen Sie das Scan-Programm, das Sie benutzen möchten.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, die Ihre Scanstrategie festlegen: Zähne/Flexible Multi-Die/Multi-Die.
3. Die Methoden können sich je nach ausgewähltem Scan-Programm unterscheiden.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Zähne	☐	☐
Kiefer	☐	☐
Flexible Multi-Die	☒	☐
Multi-Die	☒	☐

4. Wählen Sie Zähne, Kiefer oder Matrizennummern für den Scanvorgang.
5. Wählen Sie Typ - Methode - Material - Farbton.
 - Wenn Sie Informationen falsch eingegeben haben, gehen Sie zurück, um sie erneut auszuwählen.
 - Die ausgewählten Informationen werden automatisch in der Liste registriert.
6. Klicken Sie auf „Speichern“ um Ihre Registrierung zu speichern.

Eingabe auf der Tab CAD


1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, die Ihre Scanstrategie festlegen: Zähne/Flexible Multi-Die/Multi-Die.

Die/Multi-Die.

2. Wählen Sie die Zahnnummer/Kiefer/Matrizennummer.
3. Legen Sie die Einstellungen für detaillierte Optionen und CAD-Operationen fest.
4. Klicken Sie auf „OK“ um die Einstellungen zu speichern.
 - Die ausgewählten Informationen werden automatisch in der Liste registriert.
5. Klicken Sie auf „Speichern“.

Verbinden von Zähnen zu einer Brücke

Sie können mehrere Zähne zu einer Brücke verbinden, wenn das gleiche Material auf mehrere Nachbarzähne aufgetragen wird. Klicken Sie auf das Brücke-Symbol neben den ausgewählten Zähnen, um sie zu verbinden oder zu trennen.

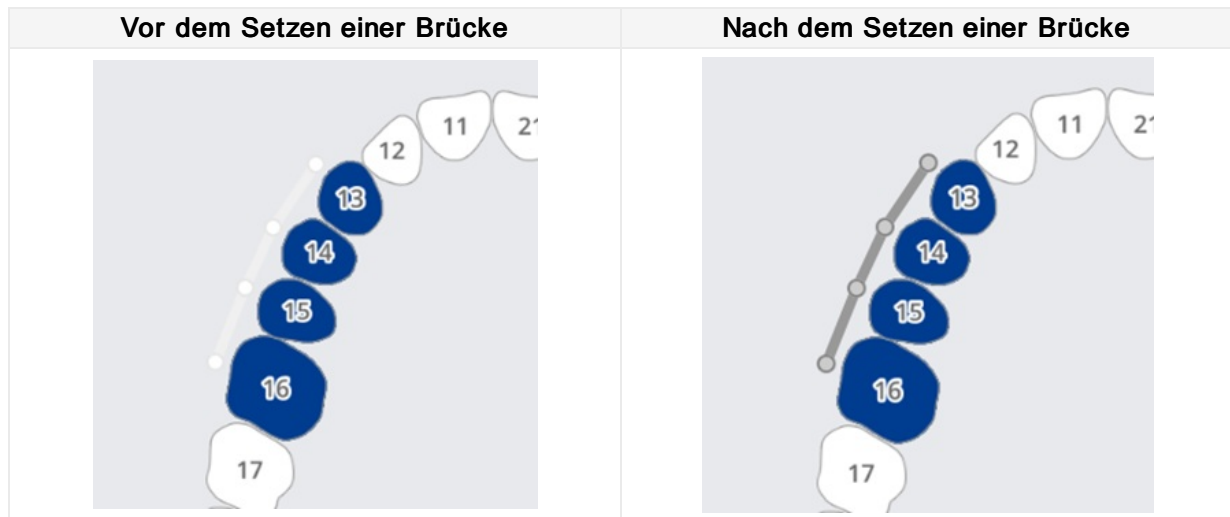

Scan-Optionen einstellen

Abhängig von dem Programm, mit dem Sie arbeiten, stehen Ihnen verschiedene Scan-Optionen zur Verfügung.

Zeigt Optionen zur Auswahl des Artikulators im Scan-Programm an.

Medit Scan for Labs

Allgemein Optionen

	Nachbarzähne	Markieren Sie die vorbereiteten und Nachbarzähne und übergeben Sie diese Informationen an das Scanprogramm.
	Antagonist	Markiert automatisch den Antagonisten und übergibt diese Information an das Scan-Programm.
	Artikulator	Optionen zur Auswahl des Artikulators im Scan-Programm anzeigen.
	Bewegungsmarkierung	Ermöglichen Sie das Benutzen der Scanstrategie „Kieferbewegung“ im Scanprogramm.

Optionen nach Zähnen

	Scankörper	Ermöglichen Sie die Einstellung einer Strategie zum Scannen von Scankörpern im Scanprogramm.
	Prä-Op	Ermöglichen Sie die Einstellung einer Strategie zum Scannen eines Prä-Op

	Scan	Modells im Scanprogramm.
	Wax-Up-Scan	Ermöglichen Sie die Einstellung einer Strategie zum Scannen von Wax-ups im Scanprogramm.

Zu Favoriten hinzufügen

Sie können ein Produkt schnell auswählen, indem Sie es als Favorit anmelden.

Die Liste der registriert Favoriten wird als Schablone verwaltet und kann über die Exportieren- und Importieren-Funktionen weitergegeben werden.

Zu Favoriten hinzufügen

1. Wählen Sie die Zahnnummer.
2. Wählen Sie Typ - Methode - Material - Farbton.
 - Typ - Methode - Material - Farbtöne können als Favoriten registriert werden, auch wenn nicht alle davon ausgewählt sind.
3. Klicken Sie auf das Symbol „Stern“.

4. Eine Kombination der ausgewählten Parameter, mit Ausnahme der Zahnnummer, wird in Ihrer Favoriten-Suchliste aufgeführt.

Verwalten von Favoriten Schablonen

Sie können verschiedene Typen von Schablonen anmelden, verwalten und teilen.

Hinzufügen	Hinzufügen einer neuen Schablone.
Umbenennen	Umbenennen der aktuellen Schablone.
Löschen	Löschen der aktuellen Schablone.
Exportieren	Exportieren der aktuellen Schablone in eine Datei.
Importieren	Importieren einer Schablone Datei.

Arbeiten am Scannen/CAD

Scanvorgang

Basierend auf den eingegebenen Informationen fahren Sie mit dem Scannen fort.

1. Geben Sie die Behandlungsinformationen ein bzw. speichern Sie sie und wählen Sie die erforderlichen Scanoptionen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Scannen“ in der oberen rechten Ecke des Fensters.

CAD-Prozess

Medit Link ist mit exocad integriert.

CAD	Anmelden von Behandlungsinformationen	Bestätigung der Behandlungsinformationen	Direkte CAD- Ausführung	Importieren der CAD- Ergebnisse zurück nach Medit Link
exocad	☐	☐	☐	☐

1. In Einstellungen > Verbundenes Programm einstellen können Sie das CAD-Programm Ihrer Wahl aus der Liste verknüpfen.
2. In der Tab CAD können Sie Aufgabeninformationen und Designoptionen eingeben/speichern.
3. Klicken Sie auf „CAD“ in der oberen rechten Ecke des Fensters.
4. Das verknüpfte CAD-Programm wird ausgeführt, und die Daten werden automatisch gesendet.
5. Speichern Sie die Ergebnisse nach der Durchführung von CAD.

iHinweis

Medit Link für Mac unterstützt die Funktion zur Verknüpfung mit CAD nicht.

Ergebnisdateien abrufen

Open File/Save File/Save As/Save As Template

Scan-Ergebnisdateien exportieren

Zusätzlich zur gemeinsamen Nutzung der Ergebnisse mit Partner über Bestellungen können Sie mit Medit Link Ihre Ergebnisse mit Hilfe der Exportieren-Funktion im gewünschten Dateiformat speichern.

Dateien exportieren nach	Gibt den Pfad an, unter dem Sie die Ergebnisse speichern möchten.
Ordnername	Das System erstellt einen neuen Ordner und speichert alle Ergebnisse darin. Der Standard-Ordnername wird durch die Benennungsregel festgelegt. Sie können den Ordnernamen jedoch direkt ändern. Sie können die Benennungsregel über Einstellungen > Export-Optionen > Regeln für Ordnernamen definieren
Dateiname	Legt den Dateinamen für das Ergebnis fest. Die Benennungsregel legt den Standard-Dateinamen fest. Sie können den Dateinamen jedoch direkt ändern. Sie können die Benennungsregel über Einstellungen > Export-Optionen > Regeln für Dateinamen definieren
CAD-Typ	Wählen Sie das CAD-Programm aus, das Sie für Ihr Konstruktionsprogramm benutzen möchten. Medit Link passt die Dateien auf der Grundlage dieser Auswahl an, so dass Sie mit der Konstruktion ohne zusätzliche Achsenausrichtung fortfahren können.
Mesh-Format	Legt das Format der Mesh-Datei fest.
Bildformat	Legt das Format der exportierten Bilddateien fest.
Dateien komprimieren	Komprimiert alle Ergebnisse in eine einzige Datei.


Einzelne Mesh kombinieren	Kombiniert das Ergebnis von Oberkiefer oder Unterkiefer mit dem einzelnen Zähnen. Nützlich, wenn das Importieren mehrerer Dateien in ein Programm nicht möglich ist.
----------------------------------	--

Alle Okklusalbeziehung exportieren	Wenn mehrere okklusale Ergebnisse aus der Scan-App generiert werden, können Sie alle okklusale Ergebnisse auf einmal exportieren.
Fallinformationen als PDF speichern	Speichern Sie die Fallinformationen als pdf mit dem Ergebnis.


Ausgewählte Dateien exportieren

Medit Link bietet eine Exportieren-Funktion aus dem erweiterten Menü im Datei-Viewer. Benutzen Sie diese, und Sie können die ausgewählten Dateien einfach exportieren.

1. Klicken Sie auf das Symbol „Menü“ neben der Datengruppe oder einer Entität im Datenbaum des Datei-Viewer.
2. Klicken Sie dann auf „Exportieren“.

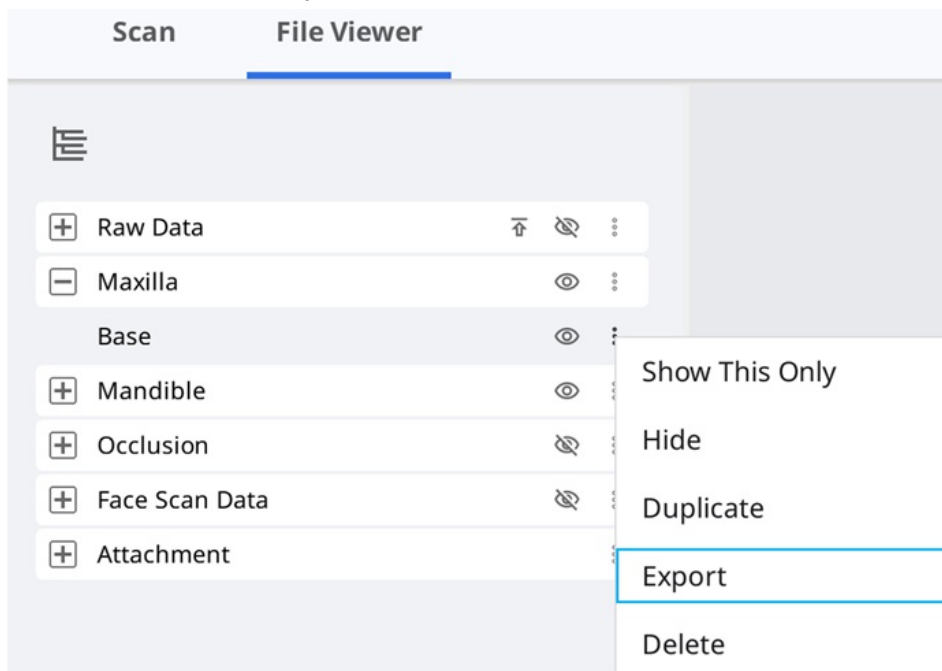

3. Im Exportieren-Dialog werden nur die ausgewählten Dateien angezeigt, die Sie exportieren möchten.

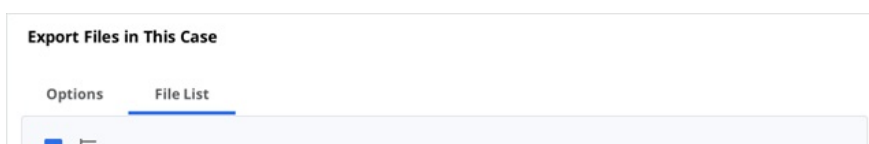

☒ Maxilla
☒ Pre-Op
☒ Base
☒ Scan Body Base
☒ Mandible
☒ Pre-Op
☒ Base
☒ Scan Body Base
☒ Occlusion
☒ First Occlusion

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close Export

4. Klicken Sie schließlich auf „Exportieren“.


Grenzlinien exportieren

Medit Scan for Clinics bietet die Funktion zur Erstellung der Grenzlinie und Medit Link kann die Grenzlinie an das CAD-Programm übertragen.

Grenzlinie als Farbe exportieren

Im Allgemeinen konvertiert Medit Link die Grenzlinie als Farbe und exportiert das Ergebnis mit Oberkiefer oder Unterkiefer zusammen. Sie können die Grenzlinie in ihrem CAD-Programm erstellen, indem Sie auf die Farbinformationen verweisen.

Beispiel:

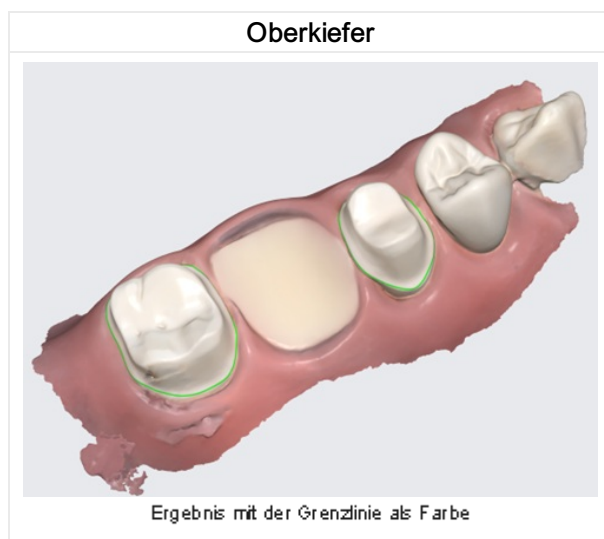

iHinweis

Diese Funktion ist für Formate verfügbar, die Farbinformationen enthalten, wie z.B. meditMesh, OBJ und PLY. Die Grenzlinie wird nicht in STL konvertiert.

iHinweis


CAD-Typ > 3shape unterstützt diese Funktion nicht.

Grenzlinie als Datei exportieren

Im Fall von exocad exportiert Medit Link die Grenzlinie in die Datei „~margin.xyz“, die direkt in exocad importiert werden kann.

Sie können diese Datei ohne zusätzliche Arbeit in Exocad benutzen.

Beispiel:

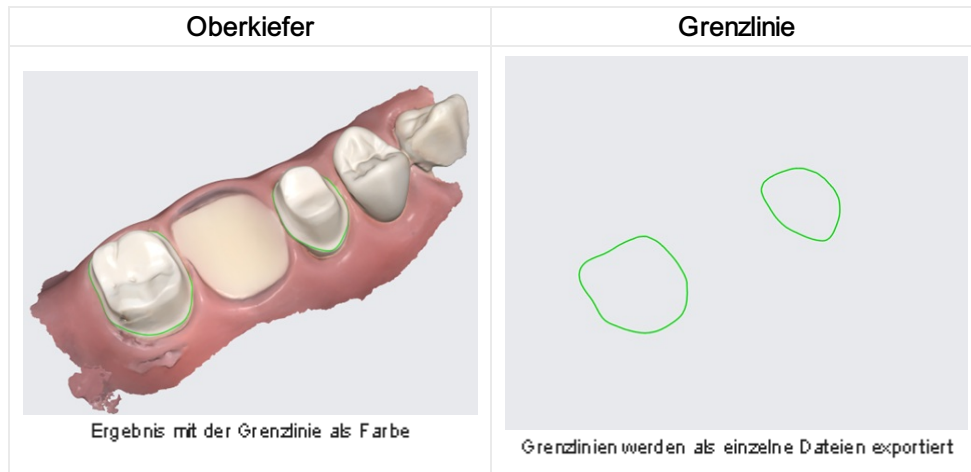

Exportieren der Fall-Liste als CSV

Medit Link bietet die Funktion zum Exportieren der Fall-Liste im CSV-Format.


Sie können die Fall-Liste mit den grundlegenden Informationen exportieren und die Fälle einfach verwalten.

Die Funktion „Zu CSV exportieren“ ist im folgenden Menü der Anwendung Medit Link verfügbar.

- In Box
- Work Box

So exportieren Sie die Fall-Liste

1. Gehe zu In Box oder Work Box.
2. Wählen Sie die Fälle aus, die Sie exportieren möchten.

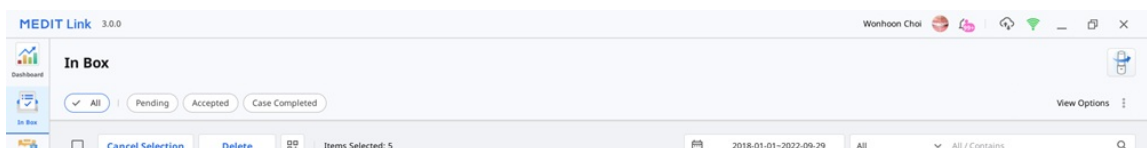

	Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Clinic Name	Order ID	Price
☐	Pending	test's Case	test	2022-09-29 오전 8:13	2022-10-01 오전 10:30	Wonhoanchoi-Clinic	10413603	
☐	Pending	test's Case - Clone	test	2022-09-22 오후 7:03	2022-09-24 오전 10:30	Wonhoanchoi-Clinic	10374886	
☐	Pending	test's Case - Clone	test	2022-09-22 오후 7:01	2022-09-24 오전 10:30	Wonhoanchoi-Clinic	10374864	
☐	Accepted	test's Case	test	2022-09-13 오후 2:43	2022-09-15 오전 10:30	Wonhoanchoi-Clinic	10314293	
☒	Pending	test's Case	test	2022-09-05 오전 7:31	2022-09-07 오전 10:30	Wonhoanchoi-Clinic	10268220	
☐	Case Completed	Worked with 2.3.6 - Clone - Clone - Clone - Clone	test	2021-07-01 오전 8:51	2021-07-08 오전 8:50	Wonhoanchoi-Clinic	8579990	500 KRW
☒	Case Completed	test's Case - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone	test	2021-08-31 오후 4:10	2021-09-07 오후 4:10	Wonhoanchoi-Clinic	8730156	2,000 KRW
☒	Case Completed	test's Case memo	test	2022-04-08 오후 11:...	2022-04-15 오후 7:45	Wonhoanchoi-Clinic	9569817	

3. Klicken Sie oben auf die Schaltfläche „Erweitertes Menü“, um die Option „Zu CSV exportieren“ auszuwählen.



4. Legen Sie den Pfad und den Dateinamen fest und speichern Sie die Ergebnisse.

Dateien von Medit Link Web herunterladen

Medit Link bietet eine Herunterladen-Funktion.

Wenn Sie die Ergebnisdateien erhalten möchten, ohne die Anwendung Medit Link zu installieren, können Sie die Dateien vom Medit Link Web-Dienst herunterladen.

iHinweis

Die Daten müssen in die Medit Cloud hochgeladen werden, um die Dateien aus dem Web herunterzuladen.

Die Herunterladen-Funktion ist im folgenden Menü des Medit Link Webdienstes verfügbar.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Oben rechts finden Sie die Schaltfläche „Herunterladen“.





Web Viewer

Wenn Sie den Fall über Case Talk teilen, können Sie festlegen, ob das Herunterladen erlaubt werden soll oder nicht.

Wenn Sie das Häkchen bei „Herunterladen-Erlaubnis erteilen“ setzen und den Fall teilen, können alle Benutzer, die sich mit dem geteilten Link verbinden, die Dateien herunterladen.

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

PIN Code: ☐ PIN Code

You can extend the period up to 90 days from today.

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment:


0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close **Get Link**

Im Web Viewer finden Sie das Symbol „Herunterladen“ oben rechts.



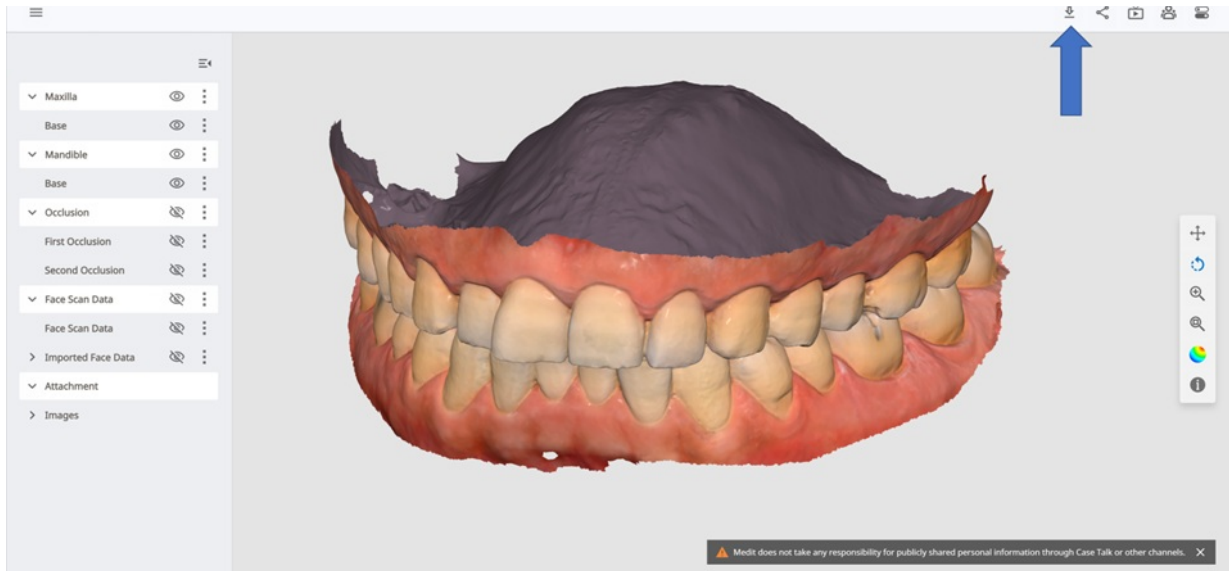

Wie Sie herunterladen

1. Klicken Sie auf „Herunterladen“.



2. Wählen Sie das Mesh-Format aus dem Herunterladen-Dialog.

Download [Premium Feature](#)

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

3. Klicken Sie dann auf „OK“.

Fälle bestellen/verwalten

Sie können ganz einfach einen Fall mit den von verbundenen Programmen erfassten Daten und den vom Benutzer

Sie können ganz einfach einen Fall mit den von verschiedenen Partnern erhaltenen Daten und den vom Benutzer angehängten Daten bestellen.

Fälle bestellen

Sie können in Case Box eine Bestellung für Ihre Partner aufgeben.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bestellung“.
2. Überprüfen Sie die für Ihre Bestellung erforderlichen Informationen.

The screenshot shows the 'Order' form with the following details:

- Partner:** WonhoonChoi_Lab_Stage
- Case Name:** mandibular movement - Clone - Clone
- Patient Name:** Test Occlusion
- Requested Delivery Date:** 2023-04-13
- Delivery Time:** AM 8:00 to PM 8:00
- Share patient information:** ☒
- Include all occlusion relationships in the order:** ☒
- Include Tags In The Order:** ☒

3. Wählen Sie einen Partner.
4. Überprüfen Sie die Produktinformationen auf der Tab Bestellliste.
 - Sie können entscheiden, ob Sie den Patientennamen teilen möchten.
5. Markieren Sie die zu bestellenden Dateien auf der Tab Dateiliste.
6. Geben Sie Ihr gewünschtes Lieferdatum ein.
 - Der Standardwert ist auf 7 Tage nach dem Bestelldatum eingestellt.
7. Sie können Ihrem Partner ein Notiz und Tags hinzufügen, um bestimmte Einzelheiten zu erläutern.
8. Wenn mehrere okklusale Ergebnisse von der Scan-App generiert werden, können Sie alle okklusale Ergebnisse auf einmal versenden, indem Sie „Alle Okklusalebeziehung bestellen“ aktivieren.
9. Fahren Sie mit Ihrer Bestellung fort.
 - **Zahlung überspringen:** Fahren Sie mit der Bestellung fort, ohne das von Medit Link bereitgestellte Zahlungssystem zu benutzen. Verfügbar, wenn Sie bei einem Partner mit dem Status „Vertragspartner“ bestellen.
 - **Bezahlen** Benutzen Sie das von Medit Link bereitgestellte Zahlungssystem, um mit der Bestellung fortzufahren. Verfügbar bei Bestellung bei einem Vertragspartner.
 - **OK:** Wir führen die Bestellung ohne Bedingungen bezüglich des Preises des Produkts durch. Verfügbar, wenn Sie bei einem Partner mit dem Status „Partnerschaft“ bestellen.

iHinweis

Die folgenden Dienste sind auf Medit Link China nicht verfügbar.

- Zahlung überspringen
- Bezahlen

Bestellung bestätigen (In Box)

- Akzeptieren Sie die Bestellung, sobald Sie sie erhalten haben.
- Akzeptierte Bestellungen werden an die Work Box weitergeleitet.

Bestellung abbuchen (Order Box)

- Sie können eine Bestellung abbuchen, bevor Ihr Partner sie annimmt.
- Abgebrochene Fälle können nachbestellt werden.

Bestellung ablehnen (In Box)

- Sie können eine eingegangene Bestellung ablehnen.
- Abgelehnte Fälle können nachbestellt werden.

Prüfung bestellter Fälle

Sie können die Einzelheiten der Fall, die Sie aus der Order Box bestellt haben, in Ihrem Praxis-Konto überprüfen. Sie können auch den Fall überprüfen, den Sie aus der In Box im Labor-Konto erhalten haben.

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
23	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
24	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
25	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00
26	Inlay	-	Zirconia	None Shade	1.00

Total USD 4.00

Bestellinfo

Folgende Informationen können in die Bestellung aufgenommen werden: Bestell-ID/Patientenname/Kontoname/Scan-Datum/Bestelldatum/Lieferdatum/Liefertermin/Notiz. Sie können die Einzelheiten des bestellten Produkts und die Lieferinformationen überprüfen.

	überprüfen.
Bestellliste	Die Bestellliste zeigt die Einzelheiten des bestellten Produkts an.
Lieferung	Geben Sie die Versandinformationen ein/überprüfen Sie sie.

Eingabe von Versandinformationen (In Box)

Geben Sie die Versandinformationen für die abgeschlossene Fall ein und beginnen Sie mit dem Versand.

1. Klicken Sie auf die Tab Versand.
2. Geben Sie die Versandinformationen ein und klicken Sie auf „Anmelden“.

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Die eingegebenen Informationen werden an Ihren Partner gesendet.

Lieferdatum verwalten

Sie können das voraussichtliche Lieferdatum festlegen, wenn Sie eine Bestellung aufgeben, und diese Information wird an Ihren Partner weitergeleitet.

Angefragtes Lieferdatum einstellen (Praxis-Konto)

- Bei einer Bestellung über Case Box können Sie das angefragtes Lieferdatum eingeben.

Order

General Order List File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name: mandibular movement - Clone - Clone
Patient Name: Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date: 2023-04-13
Delivery Time: AM 8:00 to PM 8:00

Memo:
Tags:
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Der Standardwert ist 7 Tage nach dem Datum der Bestellung.
- Geben Sie das Datum/Uhrzeit ein, zu dem Sie die Produkte erhalten möchten und fahren Sie mit der Bestellung fort.
- Sie können die Uhrzeit einfach mit dem Schieberegler einstellen.

Erwartetes Lieferdatum einstellen (Praxis-Konto)

- Sie können das voraussichtliche Lieferdatum für den Fall eingeben, der über In Box bestellt wurde.

MEDIT Link 3.0.0

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic


Order ID: 10413603
Patient Name: test
Partner Name: Wonhoonchoi-Clinic
Scanning Date: 2022-09-29 07:56
Order Date: 2022-09-29 07:13
Requested Delivery Date: 2022-10-01
Expected Delivery Date: 2022-10-01

Memo:
<Scanbody Library>
16: 00ENTIS_Custom_INMR ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long, 16mm - N-HEX_T10
15: 00ENTIS_Custom_INMR ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long, 16mm - N-HEX_T10
14: 00ENTIS_Custom_INMR ver 1.41 - Custom_Mini_Extra Long, 16mm - N-HEX_T10

No.	Type	Method	Material	Shade	Price
16	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
15	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0
14	Implant Crown	Cementation Ty...	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	0

Total: KRW 0

1. Überprüfen Sie das angefragtes Lieferdatum mit dem Partner und verschieben Sie den Termin mit der Schaltfläche „Bearbeiten“.
2. Geben Sie das erwartetes Lieferdatum unter Berücksichtigung des aktuellen Arbeitstages ein. Falls erforderlich, können Sie auch einen Kommentar hinterlassen.
3. Klicken Sie auf „Anwenden“.

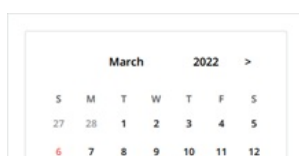

4. Das erwartetes Lieferdatum und der Notiz werden zusammen mit der Bestellung weitergeleitet.
 - Sie können das Datum und die Notizen in der Order Box überprüfen.
 - Sie können das voraussichtliche Lieferdatum ändern, und die Änderungen werden an Ihren Partner weitergeleitet.
5. Über die Schaltfläche „Verlauf“ können Sie den Fallgeschichte überprüfen.



Fälle abgeschlossen

Vervollständigen (Work Box/In Box)


Wenn alle Aufgaben erledigt sind, drücken Sie auf „Done“, um die Arbeit an dem Fall abzuschließen.

Einen Fall aus der Einzelheit heraus abschließen

Sie finden die Schaltfläche „Menü“ rechts neben der Schaltfläche „Öffnen“.



Schließen Sie die Arbeit ab, indem Sie auf das Symbol „Menü“ klicken und „Done“ wählen.

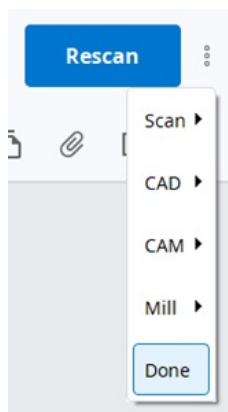


Mehrere Fälle aus der Fall-Liste abschließen

Wenn Sie die Fälle aus der Work Box auswählen, wird oben in der Liste die Schaltfläche „Erweitertes Menü“ angezeigt.



Schließen Sie mehrere Fälle wie folgt ab:

1. Gehe zu Work Box.
2. Wählen Sie alle Fälle aus, die Sie abschließen möchten.

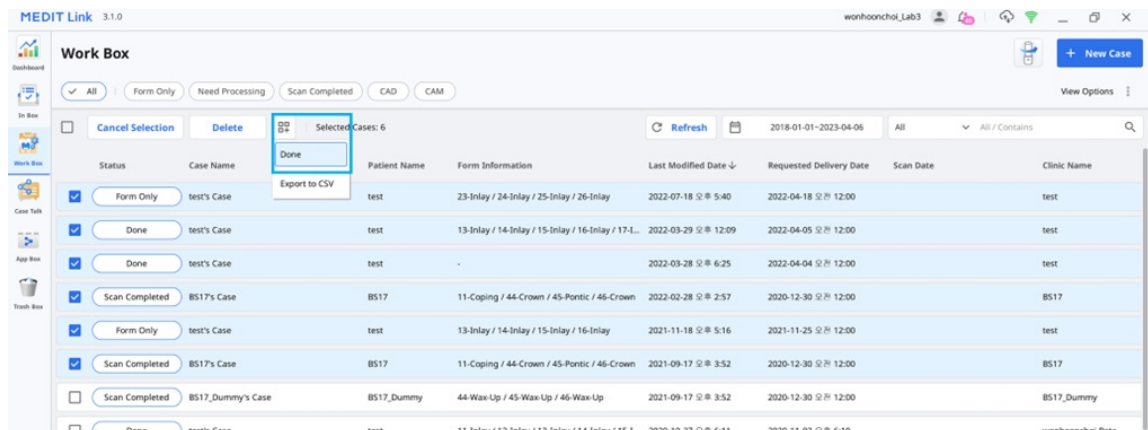

3. Klicken Sie auf die oben erwähnte Schaltfläche „Erweitertes Menü“.




4. Wählen Sie „Done“ aus der Liste

Vervollständigen (Case Box/Order Box)

Nachdem der Fall vom Labor abgeschlossen wurde, muss die Praxis den Fall bestätigen, um den gesamten Bestellvorgang abzuschließen.

Wenn das Labor seine Arbeit abgeschlossen hat, findet die Praxis die Funktion „Lieferung bestätigen“ in der Order Box.


Wenn Sie darauf klicken, ist der gesamte Bestellvorgang abgeschlossen und der Fallstatus wird in „Case Completed“ geändert.

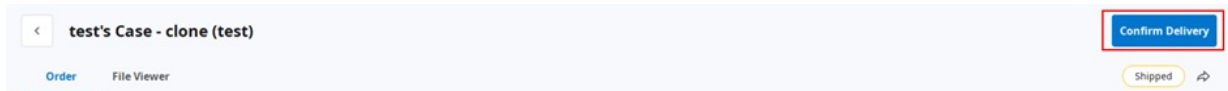

Schließen Sie einen nicht geordneten Fall in der Case Box ab

Fälle, die nicht für das Labor bestellt sind, können Sie in der Case Box abschließen.

1. Gehe zu Case Box.
2. Wählen Sie den Fall, den Sie abschließen möchten.

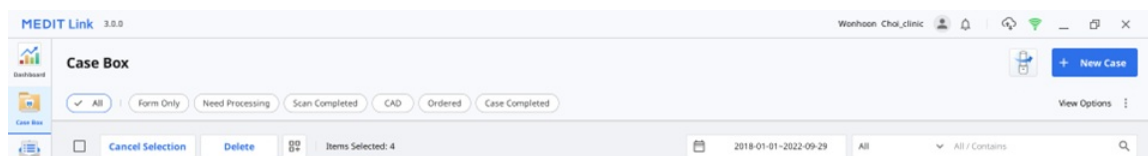

		Case Completed				
	Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date
	☐ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-29 오후 8:45	
	☐ Ordered	test's Case	test	14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown	2022-09-29 오후 8:13	2022-09-29 오후 7:56
	☒ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 5:56	
	☒ Form Only	test's Case	test	-	2022-09-28 오후 10:41	
	☒ Scan Completed	test's Case	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-28 오후 9:27	
	☒ Scan Completed	Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ...	test	24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay	2022-09-27 오후 7:03	2021-05-14 오후 9:27
	☐ Scan Completed	Preop 사용용 케이스 - Clone	straumann	15-Inlay / 26-Pontic	2022-09-27 오후 5:09	2021-11-18 오후 6:53

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erweitertes Menü“.



4. Wählen Sie „Case Completed“.

Benutzen von Tags für die Kommunikation

Sie können mit Hilfe von Tags zusätzliche Informationen zu Ihrem Fall hinzufügen und diese an Ihre Partner senden.

Tags beim Erstellen eines neuen Falls hinzufügen

Sie können Tags eingeben, wenn Sie einen neuen Fall erstellen oder Fallinformationen bearbeiten.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Register

Register & Scan

Sie können ganz einfach nach Tags suchen und auswählen, die Sie bereits benutzt haben.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet tagtest tag tat2

Tags bei der Bestellung hinzufügen

Sie können Tags während der Bestellung im Dialogfeld Bestellung überprüfen und bearbeiten.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
Doctorname Specialmaterial SpecialComment

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

Tags in den Fall Einzelheiten überprüfen

