


# USER GUIDE

**Medit Link**

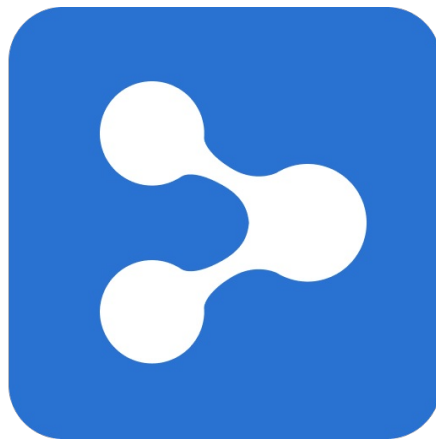

# Table of Contents

## Medit Link

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 소개                    | 6 |
| Medit Link            | 6 |
| 서비스 개요                | 6 |
| 클라우드 서비스              | 7 |
| 주문 시스템을 이용한 워크 플로우 관리 | 7 |

## Medit Link > 설치

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 시스템 요구 사양                | 8  |
| Windows 시스템 요구 사항        | 8  |
| macOS 시스템 요구 사항          | 8  |
| Medit Link Web 시스템 요구 사항 | 8  |
| 웹 브라우저 권장 사양             | 8  |
| 모바일 기기 최소 사양             | 8  |
| Windows 설치               | 9  |
| macOS 설치                 | 11 |

## Medit Link > 시작하기 전에

|                 |    |
|-----------------|----|
| 가입 및 로그인        | 15 |
| Medit Link 웹사이트 | 15 |
| 회원가입            | 15 |
| 로그인 및 기본 정보 입력  | 17 |

## Medit Link > Medit Link Web

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 화면 구성                     | 19 |
| Dashboard                 | 20 |
| Dashboard 개요              | 20 |
| Medit Insights            | 20 |
| Medit Insights 구독         | 21 |
| Medit Insight 이메일 수신 해제하기 | 22 |
| Case Box/Work Box         | 23 |
| 케이스 필터링                   | 23 |
| 상태를 이용한 필터링               | 23 |
| 기간 설정을 이용한 필터링            | 23 |
| 검색 기능을 이용한 필터링            | 24 |
| 케이스 상세 정보                 | 24 |
| Order Box/In Box          | 26 |
| 주문 탭                      | 26 |
| Order Box/In Box에서 제공하는 탭 | 26 |
| Case Talk                 | 27 |
| Case Talk 생성하기            | 27 |
| 공유 범위 및 권한 설정             | 28 |
| Case Talk 상세              | 30 |
| 웹 뷰어                      | 30 |
| 주석                        | 31 |
| 코멘트                       | 32 |
| 실시간 화면 공유                 | 33 |
| 데이터 트리                    | 33 |
| 데이터 트리 메뉴                 | 33 |
| 3D 모델 조정                  | 34 |
| 파트너                       | 36 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 파트너 검색 .....                 | 36 |
| 내 파트너 목록 .....               | 36 |
| 파트너 초대 .....                 | 37 |
| 멤버십 .....                    | 38 |
| 멤버십 .....                    | 38 |
| 나의 플랜 .....                  | 38 |
| 클라우드 저장소 .....               | 39 |
| 멤버십 구독하기 .....               | 40 |
| 멤버십 구독 취소하기 .....            | 41 |
| 결제 정보 .....                  | 43 |
| 결제 방법 추가 .....               | 43 |
| 결제 방법 변경 .....               | 45 |
| 리딩 코드 .....                  | 46 |
| 리딩 코리딩 코드 등록 및 활성화하기 .....   | 46 |
| 리딩 코드 활성화하기 .....            | 47 |
| 결제 .....                     | 48 |
| 결제 상세 (치과, 기공소 계정) .....     | 48 |
| 대금 지급 계좌 정보 (기공소 계정) .....   | 48 |
| 내 정보 .....                   | 49 |
| 내 정보 .....                   | 49 |
| 내 회사 정보 (관리자 계정) .....       | 49 |
| 내 스캐너 .....                  | 50 |
| 내 가격 리스트 (기공소, 관리자 계정) ..... | 50 |
| 기타 메뉴 .....                  | 51 |
| 공지사항 및 업데이트 .....            | 51 |
| Medit 정보 .....               | 51 |
| 프로그램 다운로드 .....              | 51 |

## Medit Link > Medit Link App

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 화면 구성 .....                           | 53 |
| 오버뷰 .....                             | 53 |
| 타이틀바 .....                            | 55 |
| 알림 .....                              | 55 |
| 케이스 동기화 매니저 .....                     | 56 |
| 업로드 .....                             | 57 |
| 다운로드 .....                            | 57 |
| 네트워크 상태 .....                         | 58 |
| 메뉴 .....                              | 59 |
| Dashborad .....                       | 59 |
| Case Box/Work Box .....               | 59 |
| Case Box/Work Box에서 제공하는 탭 .....      | 60 |
| Case Box/Work Box에서 사용할 수 있는 기능 ..... | 60 |
| Order Box/In Box .....                | 61 |
| Order Box?In Box에서 제공하는 탭 .....       | 62 |
| Case Talk .....                       | 62 |
| App Box .....                         | 62 |
| Trash Box .....                       | 63 |
| 설정 .....                              | 63 |
| 환자 관리 .....                           | 63 |
| 새 환자 추가 .....                         | 64 |
| 환자 삭제 .....                           | 64 |
| 환자 병합 .....                           | 65 |
| 공지사항 & 업데이트 .....                     | 66 |
| Medit Link Web으로 이동 .....             | 66 |
| Medit 유용한 정보 .....                    | 66 |
| 설정 .....                              | 67 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 일반                | 67 |
| 저장소 관리            | 68 |
| 기간 설정             | 68 |
| 컴퓨터 저장 공간         | 68 |
| 클라우드 저장소          | 68 |
| 연결 프로그램 설정        | 69 |
| 내보내기 옵션           | 69 |
| 케이스 변환 도구         | 71 |
| 사용 방법             | 71 |
| 프록시 옵션            | 73 |
| 제품 정보             | 73 |
| 유저 가이드            | 73 |
| 파일 뷰어             | 75 |
| 데이터 트리            | 75 |
| 모델 조정 도구          | 75 |
| 3D 모델 조정          | 75 |
| 2D 이미지 조정         | 76 |
| 기능 도구             | 77 |
| 캡처 & 메모           | 77 |
| 교정용 캡처            | 77 |
| 빈 영역 채우기          | 78 |
| 잘라내기              | 79 |
| 교합 정렬 최적화         | 81 |
| 하악 운동             | 83 |
| 복수의 교합 결과 관리      | 83 |
| 복수의 교합 결과 관리하는 방법 | 84 |
| 보기 옵션             | 85 |
| 상태 필터             | 85 |
| 테이블 항목            | 86 |
| 목록 유형             | 87 |
| 갤러리 뷰             | 88 |
| 리스트 뷰             | 89 |
| 그룹화 방법            | 89 |
| 정렬 방법             | 90 |
| 필터링 및 검색          | 92 |
| 기간 설정을 통한 필터링     | 92 |
| 고급 검색 기능을 이용한 필터링 | 92 |

## Medit Link > 작업 순서

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 케이스 생성/편집/복제/삭제               | 94 |
| 케이스 생성                        | 94 |
| Case Box에서 케이스 생성 (치과 계정)     | 94 |
| Work Box에서 케이스 생성 (기공소 계정)    | 95 |
| 케이스 정보 편집                     | 95 |
| Case Box에서 케이스 정보 편집 (치과 계정)  | 95 |
| Work Box에서 케이스 정보 편집 (기공소 계정) | 96 |
| 케이스 복제                        | 96 |
| Case Box에서 케이스 복제 (치과 계정)     | 96 |
| Work Box에서 케이스 복제 (기공소 계정)    | 97 |
| 케이스 삭제                        | 97 |
| 케이스 삭제 (치과 계정, 기공소 계정)        | 97 |
| 품 정보                          | 98 |
| Case Box에서 치식 정보 입력           | 98 |
| 품 탭에서 치식 정보 입력                | 98 |
| CAD 탭에서 치식 정보 입력              | 98 |
| Work Box에서 치식 정보 입력           | 98 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 품 탭에서 치식 정보 입력 .....                                      | 98  |
| <b>CAD</b> 탭에서 치식 정보 입력 .....                             | 99  |
| 브릿지 설정 .....                                              | 99  |
| 스캔 옵션 설정 .....                                            | 99  |
| 일반 옵션 .....                                               | 99  |
| 치아 별 적용 옵션 .....                                          | 99  |
| 상품 즐겨 찾기 등록 및 활용 .....                                    | 100 |
| 즐거찾기 추가 .....                                             | 100 |
| 즐거 찾기 관리 .....                                            | 100 |
| 스캔 및 <b>CAD</b> 작업 .....                                  | 101 |
| 스캔 작업 진행 .....                                            | 101 |
| 캐드 작업 진행 .....                                            | 101 |
| 결과 파일 얻기 .....                                            | 102 |
| 결과 파일 내보내기 .....                                          | 102 |
| 선택한 파일 내보내기 .....                                         | 103 |
| 마진 라인 내보내기 .....                                          | 104 |
| 색상 정보로서 마진라인 내보내기 .....                                   | 104 |
| 파일로서 마진 라인 내보내기 .....                                     | 105 |
| 케이스 리스트를 <b>CSV</b> 로 내보내기 .....                          | 106 |
| 케이스 리스트 내보내는 방법 .....                                     | 106 |
| <b>Medit Link Web</b> 에서 파일 다운로드 하기 .....                 | 107 |
| <b>Case Box/Work Box</b> .....                            | 107 |
| 웹 뷰어 .....                                                | 107 |
| 파일 다운로드 하기 .....                                          | 108 |
| 주문 및 주문 관리 .....                                          | 110 |
| 연결 프로그램으로 부터 얻은 데이터, 사용자가 첨부한 데이터를 파트너에게 주문할 수 있습니다. .... | 110 |
| 주문 .....                                                  | 110 |
| 주문 수락 ( <b>In Box</b> ) .....                             | 111 |
| 주문 취소 ( <b>Order Box</b> ) .....                          | 111 |
| 주문 거절 ( <b>In Box</b> ) .....                             | 111 |
| 주문 케이스 확인 .....                                           | 111 |
| 배송 정보 입력 및 배송 ( <b>In Box</b> ) .....                     | 112 |
| 배송 예정 날짜/배송 희망 날짜 관리 .....                                | 112 |
| 배송 희망 날짜 입력 (치과 계정) .....                                 | 112 |
| 주문 완료 .....                                               | 114 |
| 주문 과정 완료 ( <b>Work Box/In Box</b> ) .....                 | 114 |
| 케이스 상세정보에서 완료하기 .....                                     | 114 |
| 케이스 리스트에서 여러 개의 주문 완료하기 .....                             | 115 |
| 주문 과정 완료 ( <b>Case Box/Order Box</b> ) .....              | 115 |
| 주문하지 않은 케이스를 “ <b>Case Completed</b> ” 상태로 변경하기 .....     | 115 |
| 태그를 이용한 커뮤니케이션 .....                                      | 117 |
| 케이스 생성/수정 시 태그 입력 .....                                   | 117 |
| 주문 시 태그 입력 .....                                          | 118 |
| 케이스 상세 화면에서 태그 확인 .....                                   | 118 |

## 소개

### Medit Link

**Medit Link**는 치과와 기공소 사이의 커뮤니케이션을 도와주는 협업 툴로 각 업무 환경에 최적화된 워크 플로우를 제공합니다.

각 계정의 형태 및 권한에 따라 특화된 기능을 제공합니다. 구강 스캐너, 모델 스캐너를 사용한 스캔 작업, 스캔한 결과물을 주문하고 기공물을 디자인하고 생산하는 과정을 관리할 수 있는 사용자 친화적인 **UI**를 제공합니다.

**Medit Link**는 컴퓨터에 설치하는 프로그램(앱)과 함께 웹에서 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다.

### 서비스 개요

|     |     | Web                                                                                                                                                                                                         | App                                                                                                                                                                  |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 회원 가입 및 관리</li> <li>• 검색</li> <li>• 파트너 검색 및 관리</li> <li>• 웹 뷰어를 이용한 케이스 공유</li> <li>• 앱에서 생성한 케이스 확인</li> <li>• 주문 관리</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 품 정보 등록</li> <li>• 스캔</li> <li>• 주문 및 결제 진행</li> <li>• CAD 연동</li> <li>• 환자 관리</li> </ul>                                   |
| 치과  | 관리자 | 파트너 및 조직의 검색 및 관리, 결제 정보 관리, 케이스 공유<br><b>Dashboard</b><br><b>Case Box</b><br><b>Order Box</b><br><b>Case Talk</b><br><b>Partners</b><br><b>Memembrship</b><br><b>Payment</b><br><b>My Info</b>             | 품 정보 등록, 스캔, 캐드 연동, 주문하기, 결제하기, 환자 관리,<br><b>Dashboard</b><br><b>Case Box</b><br><b>Order Box</b><br><b>Case Talk</b><br><b>App Box</b><br><b>Trash Box</b><br>환자 관리 |
|     | 멤버  | - Case Box<br>- Case Talk<br>- My Info                                                                                                                                                                      | - Case Box<br>- Case Talk<br>- App Box<br>- Trash Box                                                                                                                |
| 기공소 | 관리자 | 파트너 및 조직의 검색 및 관리, 결제 정보 관리, 케이스 공유<br>- <b>Dashboard</b><br>- <b>In Box</b><br>- <b>Work Box</b><br>- <b>Case Talk</b><br>- <b>Partners</b><br>- <b>Membership</b><br>- <b>Payment</b><br>- <b>My Info</b> | 품 등록 정보 등록, 스캔, CAD 연동, 주문 받기 및 주문 관리<br>- <b>Dashboard</b><br>- <b>In Box</b><br>- <b>Work Box</b><br>- <b>Case Talk</b><br>- <b>App Box</b><br>- <b>Trash Box</b>  |
|     | 멤버  | - Work Box<br>- Case Talk<br>- My Info                                                                                                                                                                      | - Work Box<br>- Case Talk<br>- App Box<br>- Trash Box                                                                                                                |

#### 참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 결제

## 클라우드 서비스

**Amazon AWS**를 통해 데이터의 자동 업로드/다운로드를 지원합니다.

클라우드에 저장된 정보를 활용해 동일한 조직에 소속된 다수의 사용자가 서로 다른 컴퓨터에서 동일한 환경으로 작업할 수 있습니다. 클라우드 기반의 백업 및 복구 기능을 제공합니다. 갑작스러운 컴퓨터의 고장으로 데이터가 손실되는 경우에도 클라우드에 저장된 데이터를 기반으로 복구가 가능하여 사용자 데이터를 안전하게 보호합니다.

파트너십을 맺은 치과와 기공소는 **Medit Link**의 클라우드 서버를 통해 빠르고 간편하게 데이터를 공유할 수 있어, 이메일로 데이터를 공유하던 기존 방식의 번거로움을 최소화해줍니다. 환자 정보와 관련된 모든 데이터는 안전하게 암호화되어 저장 및 전송됩니다. **Medit**는 의료법과 **HIPAA** 규정 및 **GDPR** 규정을 준수합니다.

## 주문 시스템을 이용한 워크 플로우 관리

**Medit Link** 자체 주문/결제 시스템을 제공합니다.

- 치과와 기공소 사이에 계약을 맺어 데이터를 빠르고 간편하게 공유할 수 있습니다.
- 주문 상태를 확인/관리할 수 있습니다.

온라인 결제 플랫폼 업체인 **Stripe**([www.stripe.com](http://www.stripe.com)), **I'mPort**(<http://www.iampart.kr>) 결제 모듈과 연동되어 쉽고 편리하게 카드 결제 서비스를 이용할 수 있습니다.

#### 참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 결제

## 시스템 요구 사양

### 참고

스캔 소프트웨어와 스캐너를 사용하는 경우에는 **Medit Scan for Clinics**와 **Medit Scan for Labs**의 시스템 요구 사양을 확인하시기 바랍니다.

### Windows 시스템 요구 사항

|          | 노트북 및 데스크톱                                      |
|----------|-------------------------------------------------|
| CPU      | Intel Core i5 2.6 GHz 이상                        |
| RAM      | 16 GB or 이상                                     |
| Graphics | NVIDIA GeForce GTX 760 2 GB 이상 및 동급의 AMD 그래픽 카드 |
| OS       | Windows 8 64-bit 이상 (32-bit 사용 불가)              |

### macOS 시스템 요구 사항

|           | Mac                                               |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Processor | M1 with 8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine |
| RAM       | 16 GB 이상                                          |
| OS        | Monterey 12                                       |

### Medit Link Web 시스템 요구 사양

#### 웹 브라우저 권장 사양

|         | 브라우저                                     |
|---------|------------------------------------------|
| PC      | Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium) |
| Android | Chrome, Firefox                          |
| iOS     | Safari, Chrome, Firefox                  |

#### 모바일 기기 최소 사양

| 유형     | Android            | iOS               |
|--------|--------------------|-------------------|
| Device | Galaxy S7 스펙 동급 이상 | iPhone 7 스펙 동급 이상 |
| OS     | Android 7.1 Nougat | iOS 11.0          |
| RAM    | 3 GB 이상            | 2 GB 이상           |
| AP     | Snapdragon 710 이상  | A10 Fusion        |


## Windows 설치

Medit Link는 스캔 프로그램인 **Medit Scan for Clinics** and **Medit Scan for Labs**와 함께 설치됩니다.


1. **Medit\_LinkSetup.exe**를 실행합니다.
2. 사용할 언어를 선택하고 “다음”을 클릭합니다.
3. 프로그램을 설치할 폴더를 지정합니다. “사용권 계약 조건”을 읽고 동의한 뒤 “설치” 버튼을 클릭합니다.



4. 설치가 진행되기 전에 컴퓨터와 스캐너가 분리되어 있는지 확인합니다. 스캐너가 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 설치가 정상적으로 진행되지 않을 수 있습니다.
5. 프로그램 설치가 자동으로 진행되며 이 과정은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 설치가 완료될 때까지 컴퓨터의 전원을 끄지 말고 기다려 주세요.

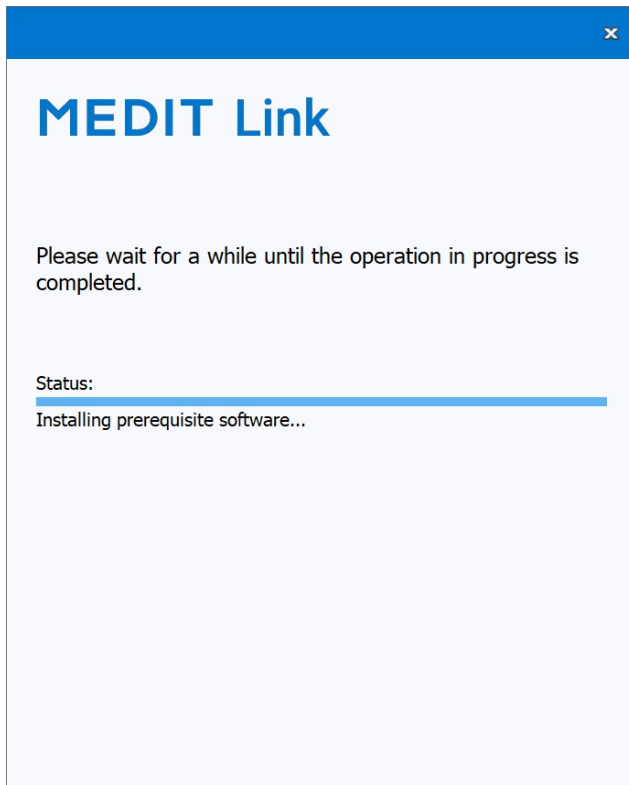

6. 설치가 완료되면 컴퓨터를 재시작하세요. 스캐너를 사용하지 않는 경우에는 이 단계를 생략할 수 있습니다.

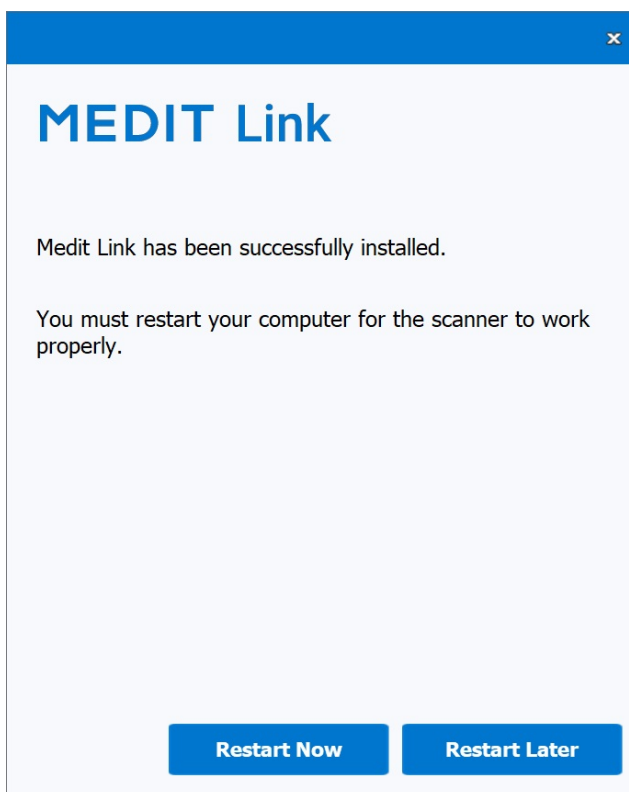


#### **i참고**

설치 완료 후 컴퓨터를 재시작하지 않으면 스캐너가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.


## macOS 설치

Medit Link는 스캔 프로그램인 Medit Scan for Clinics와 함께 설치됩니다.


1. Medit\_Link\_x.x.x.pkg를 실행하고 "계속"을 클릭합니다.

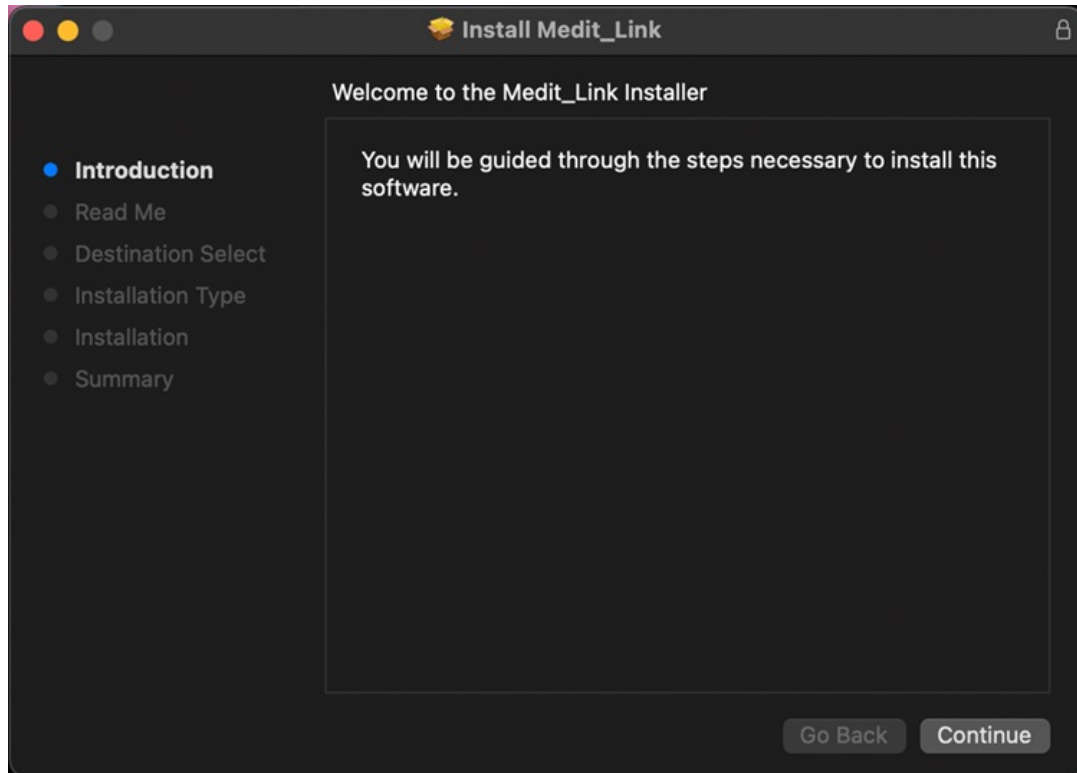


2. 최종 사용자 라이선스 계약을 읽고 "계속"을 클릭합니다.

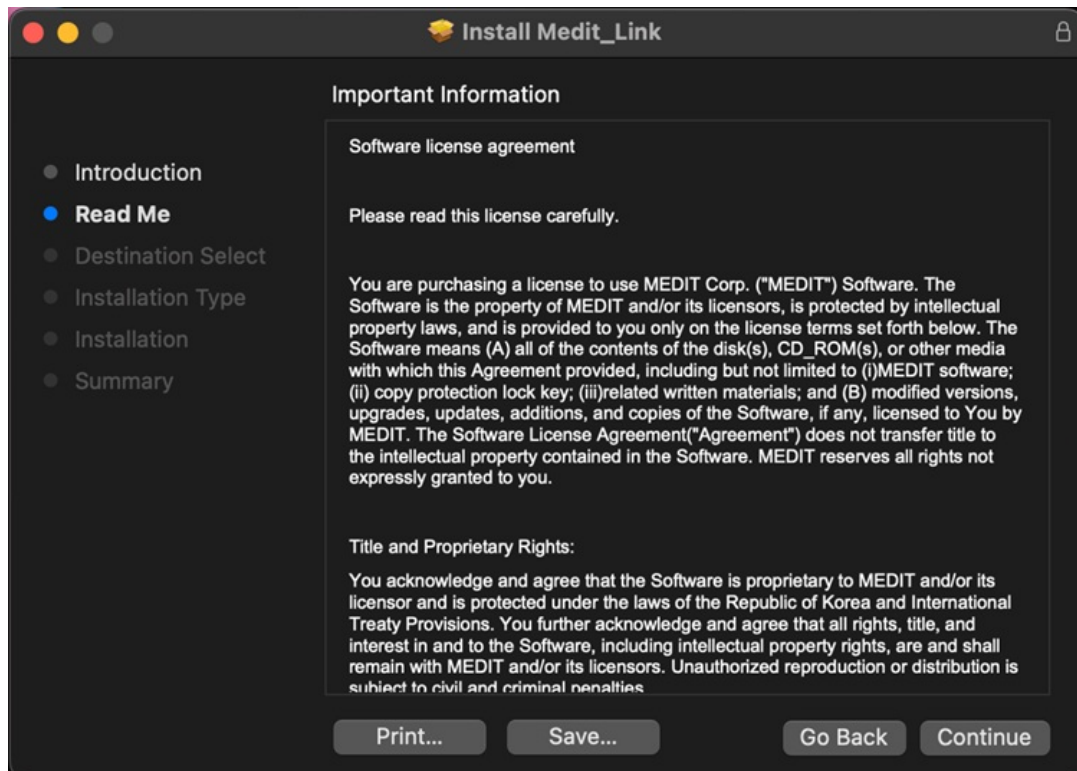

3. 설치할 디스크를 선택한 후 "계속"을 클릭합니다.

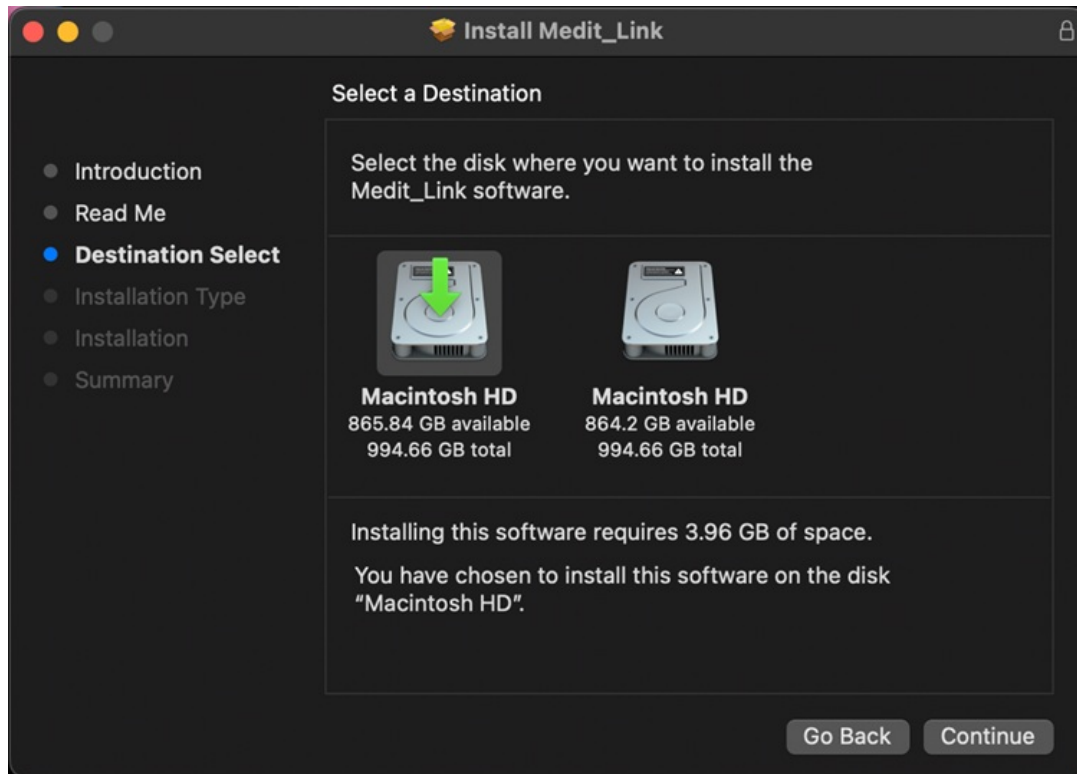


4. "설치 위치 변경..."을 클릭해서 설치 경로를 변경한 후 "설치"를 클릭합니다.

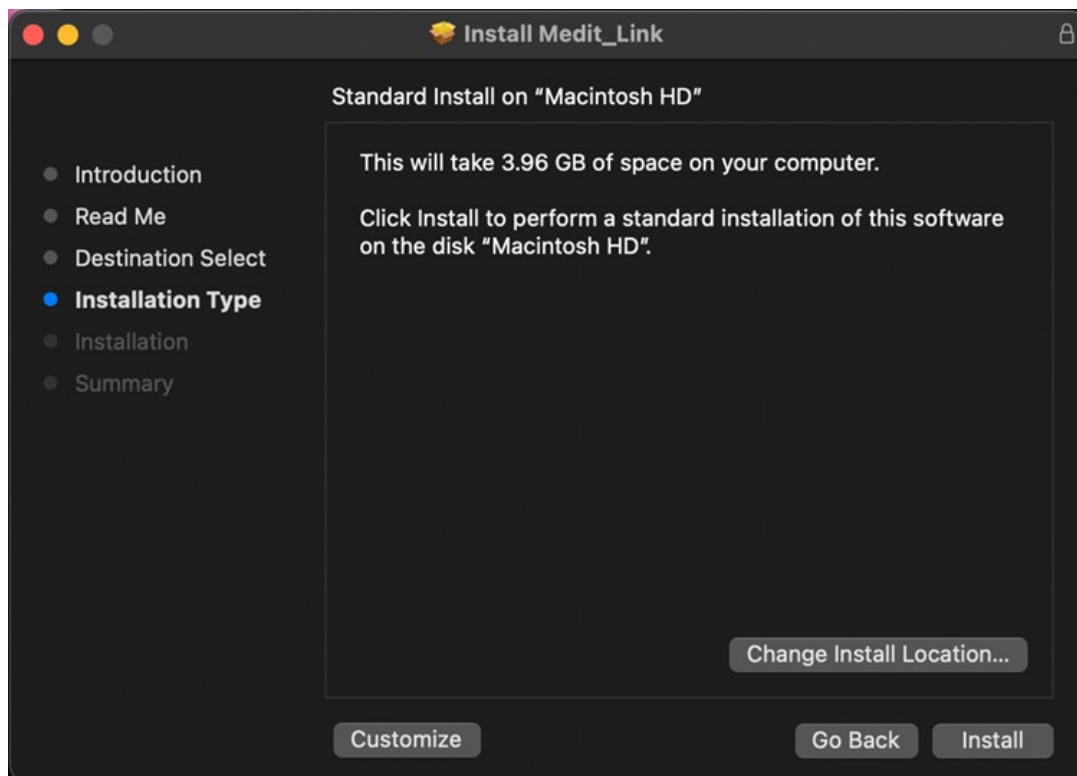


5. 아래의 창이 발생하면 지문 또는 **Mac** 로그인 비밀번호를 입력하여 설치를 허용합니다.



6. 설치가 완료될 때까지 기다리세요.

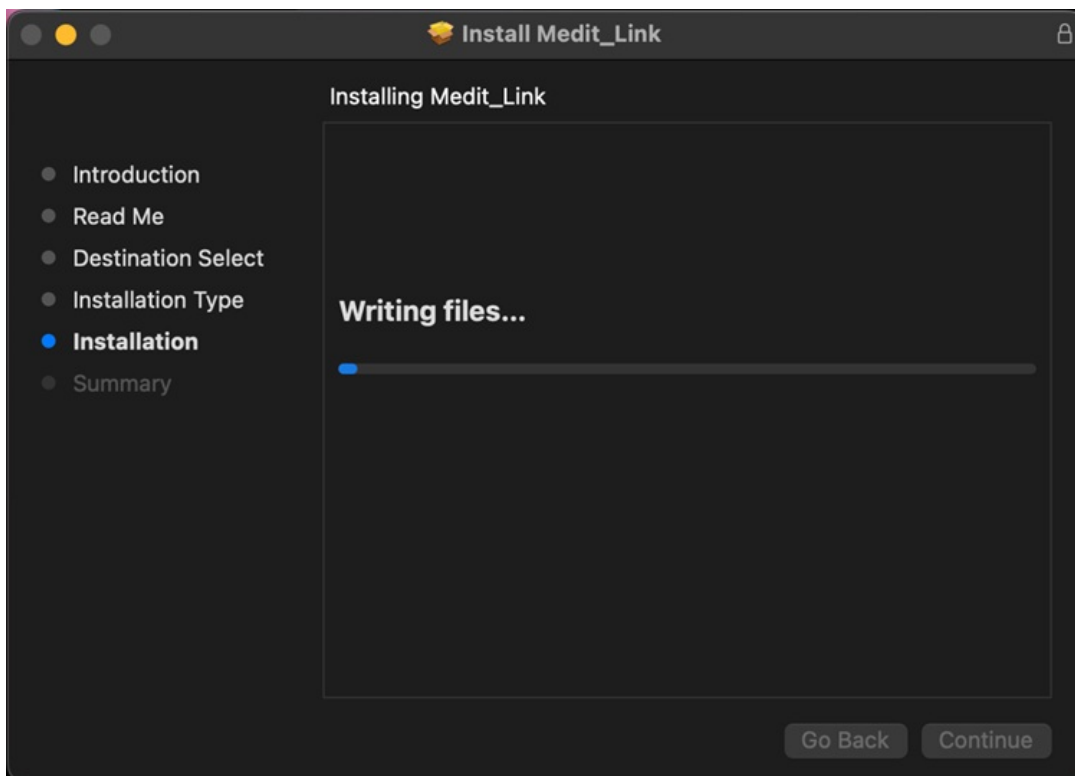


7. "닫기"를 클릭하여 설치를 종료합니다.

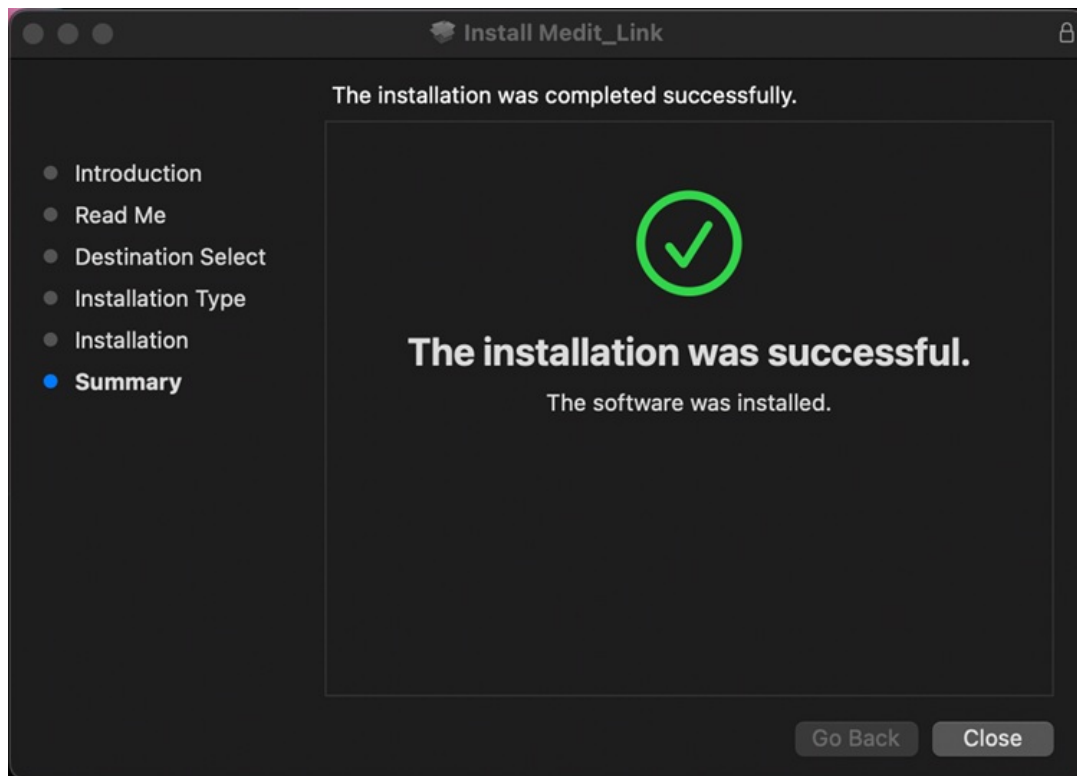

## 가입 및 로그인

### Medit Link 웹사이트

Medit Link를 이용하려면 [www.meditlink.com](http://www.meditlink.com)에서 회원가입을 진행하세요.

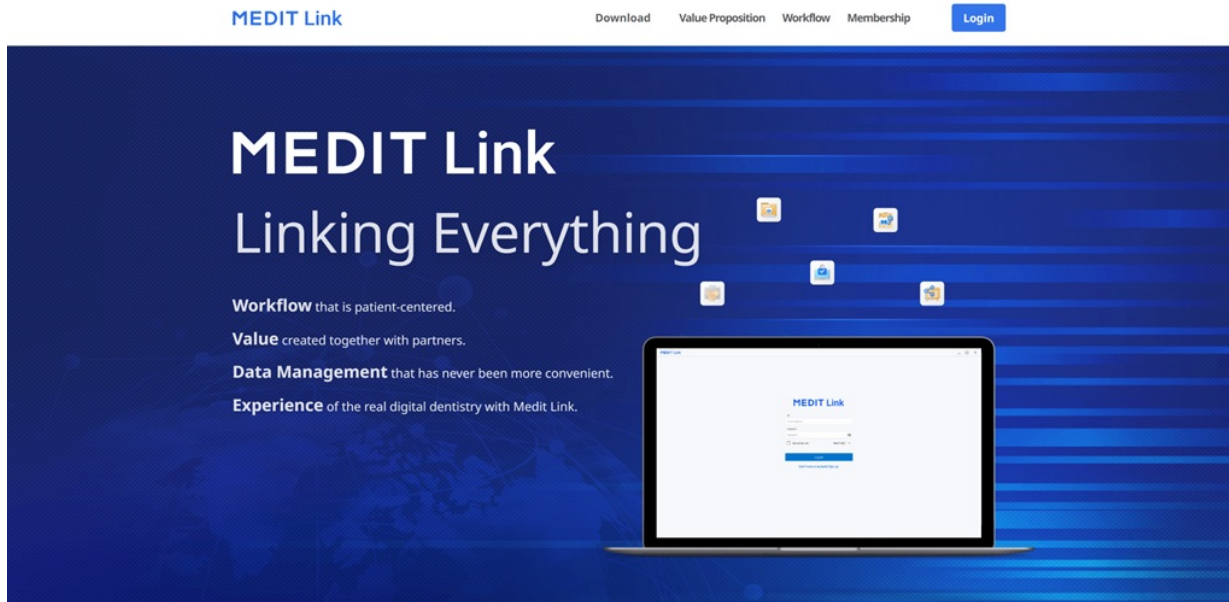

#### 참고

Medit Link China의 경우 [www.meditlink.cn](http://www.meditlink.cn)에서 회원 가입이 진행됩니다.

### 회원가입

Medit Link에서 제공하는 서비스를 사용하기 위해서는 회원 가입을 진행해야 합니다. 클리닉 또는 랩 계정으로 가입 후 Medit Link가 제공하는 기능을 사용할 수 있습니다.

아래 계정 유형 중 하나를 선택하여 회원 가입을 진행하고, 가입한 계정에 따라 제한된 기능 및 권한으로 서비스를 이용할 수 있습니다.

- 클리닉 - 관리자
- 클리닉 - 멤버
- 랩 - 관리자
- 랩 - 멤버

관리자 계정은 치과 또는 기공소의 대표이며 Medit Link의 서비스를 제한 없이 이용할 수 있습니다. 멤버 계정은 일부 기능에 대한 접근이 제한될 수 있습니다.

다음 순서에 따라 회원 가입을 진행하세요.

1. 로그인 페이지에서 회원 가입을 클릭하세요.

## MEDIT Link

**ID**

Email Address

**Password**

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help?](#)

**Log In**

[Don't have an account? Sign up.](#)

 English (United States) ▼

- 계정 유형에 대한 설명을 읽은 뒤 가입을 진행하고자 하는 계정 유형에서 "등록"을 클릭하세요.



**Clinic**



**Lab**

**Administrator**

**Dentist (Manager)**

All Medit Link functions are available.

- ✓ Order/Payment
- ✓ Member Management

**Register**

**Administrator**

**Representative/Leader (Manager)**

All Medit Link functions are available.

- ✓ Price Management for Dental Prostheses
- ✓ Order Management
- ✓ Member Management

**Register**

**Member**

**Dental Hygienist and Dental Staff**

In order to use Medit Link, join your group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.

- ✓ Oral Scanning

**Register**

**Member**

**Laboratory Employees**

In order to use Medit Link, join your lab's group as a member. Case management and basic functions will be available after you join the group.


- ✓ Receiving Data for Making Dental Prostheses
- ✓ Sharing work files and production processes.

**Register**

- 치과 이름 또는 기공소 이름을 입력하고 계정 유형에 따라 다음 안내대로 진행하세요.
  - 관리자로 가입하는 경우, "사용 가능 여부 확인"을 클릭해 입력한 이름이 사용 가능한 지 확인하세요.
  - 멤버로 가입하는 경우, "검색"을 클릭해서 소속된 치과 또는 기공소를 찾으세요. 관리자가 미리 해당 치과 또는 기공소를 등록해야만 멤버로 가입할 수 있습니다.
- 가입에 필요한 정보를 입력한 후 "등록" 버튼을 클릭합니다. 입력한 이메일 주소로 인증 메일이 발송됩니다.
- 전달 받은 링크로 이메일 주소 인증을 완료하면 회원 가입 절차가 완료됩니다.

## 로그인 및 기본 정보 입력

1. 로그인 페이지에서 이메일 주소와 비밀번호를 입력한 후 로그인합니다.

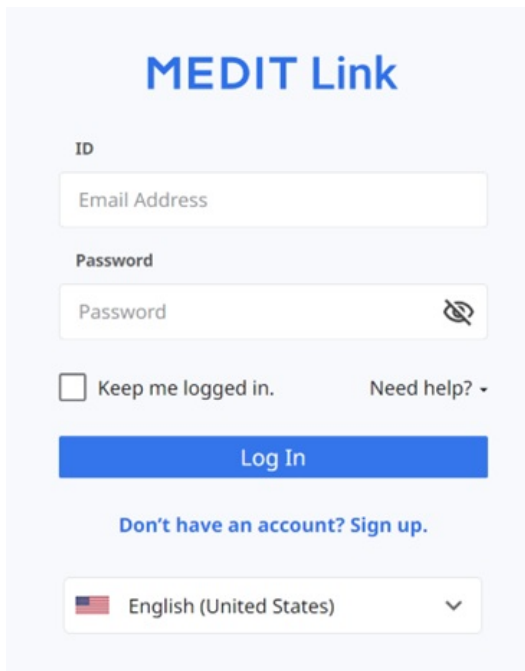

The image shows the Medit Link login page. At the top, the text "MEDIT Link" is displayed in blue. Below it, there are two input fields: "ID" with a placeholder "Email Address" and "Password" with a placeholder "Password" and a toggle icon. Below the password field, there is a checkbox labeled "Keep me logged in." and a link "Need help? ▾". A blue "Log In" button is positioned below these elements. Under the button, there is a link "Don't have an account? Sign up." At the bottom, there is a language selection dropdown menu showing "English (United States)" with a flag icon and a downward arrow.

2. 소속된 치과 또는 기공소의 정보를 입력하지 않았다면 다음과 같은 창이 뜹니다.

### 참고

관리자 계정으로 소속된 치과 또는 기공소의 정보를 입력해야만 **Medit Link**를 이용할 수 있습니다.



The image shows a "Welcome to Medit Link" page. At the top, it says "Welcome to Medit Link" and "Grow your organization through close collaboration with clinics or labs." Below this, there are four icons representing different types of information: "Address Information", "Organization Information", "Additional Information", and "Scanner Information". Below these icons, there is a section titled "Here are four simple steps to get you started with your personal order system." followed by the text "You will be able to access all of Medit Link's services after you have completed filling out your information." Below this text, there are four steps illustrated with icons and text: Step 1: "Fill in your organization information." Step 2: "Select a partner clinic or lab you want to work with." Step 3: "Create a partnership and contract with your selected partner." Step 4: "Download Medit Link on your computer and start sending and receiving cases." At the bottom right, there are two buttons: "Set Up Later" and "Set Up Now".

3. "지금 설정"을 클릭하고 주소 정보, 치과 또는 기공소 정보, 추가 정보, 스캐너 정보를 차례로 입력하세요.

마케팅 및 프로모션 정보 받기에 동의하시면 **Medit**가 제공하는 유용한 제품과 서비스에 대한 정보를 받아볼 수 있습니다.

4. 입력한 정보는 **Medit Link** 웹사이트의 내 정보 > 내 회사 정보에서 언제든지 수정할 수 있습니다.

## 화면 구성


The screenshot displays the 'Case Box' interface of the Medit Link application. The top navigation bar includes the 'MEDIT Link' logo and a user profile 'wonhoon choi'. The left sidebar contains a menu with icons for Dashboard, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, Payment, and My Info. The main content area features a 'Case Box' header with a filter bar containing buttons for 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. Below the filter bar, it shows 'Total Cases : 18' and a date range '2023-01-06 ~ 2023-04-06'. A search bar is also present. The table below lists individual cases with columns for Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanning Date, Order Date, and Lab Name. Each row includes a 'Share' button. The bottom of the table has a pagination control showing '1' and '2'.

| Status         | Case Name                         | Patient Name   | Form Information       | Last Modified Date | Scanning Date    | Order Date       | Lab Name           | Share |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-------|
| Scan Completed | mandibular movement - Clone - ... | Test Occlusion | 13, 14, 15, 16         | 2023-04-06 16:48   | 2023-04-03 10:11 | -                | -                  | Share |
| Form Only      | Occlusion Test's Case             | Occlusion Test | 14, 15, 16, 17         | 2023-04-06 14:40   | -                | -                | -                  | Share |
| Ordered        | Occlusion Test's Case             | Occlusion Test | 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 2023-04-06 14:13   | 2023-04-04 14:17 | 2023-04-06 14:13 | WonhoonChoi_Lab... | Share |
| Case Completed | mandibular movement - Clone       | Test Occlusion | 13, 14, 15, 16         | 2023-04-06 11:55   | 2023-04-03 10:11 | -                | -                  | Share |
| Case Completed | test_initial's Case               | test_initial   |                        | 2023-04-06 11:55   | -                | -                | -                  | Share |
| Case Completed | mandibular movement               | Test Occlusion | 13, 14, 15, 16         | 2023-04-06 11:55   | 2023-04-03 10:11 | -                | -                  | Share |
| Case Completed | COL-20532 test                    | test           | 12, 13, 14, 15, 16     | 2023-04-06 11:53   | -                | -                | -                  | Share |
| Case Completed | Order-test                        | test           | 23, 24, 25, 26, 27     | 2023-04-05 18:36   | -                | 2023-03-28 16:46 | WonhoonChoi_Lab... | Share |
| Form Only      | test_initial's Case               | test_initial   |                        | 2023-04-04 13:38   | -                | -                | -                  | Share |
| Form Only      | test_initial's Case               | test_initial   |                        | 2023-03-31 08:18   | -                | -                | -                  | Share |

# Dashboard

## Dashboard 개요

App과 Web에서 공통으로 확인할 수 있는 항목으로 **Medit Link**에서 진행한 전체 작업에 대한 통계를 시각화 된 그래프와 차트를 통해 확인할 수 있습니다.

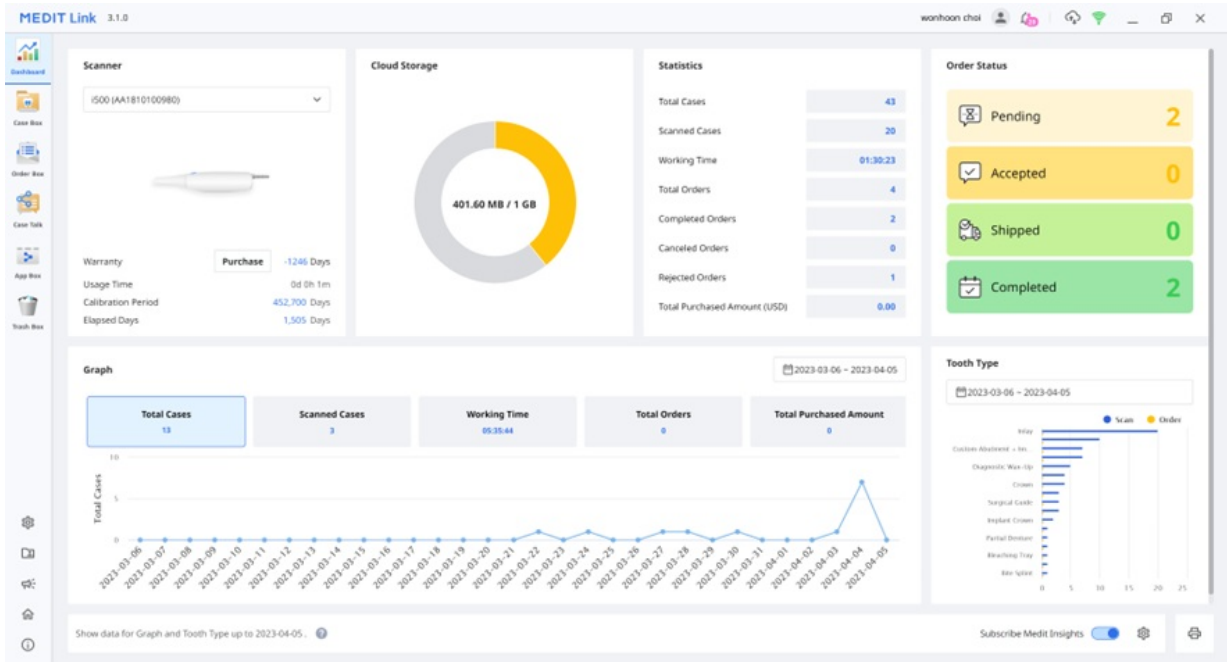

Medit Link에서 진행한 전체 작업에 대한 통계를 그래프와 차트를 통해 확인할 수 있습니다.

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 스캐너      | 워런티, 스캐너 사용 시간, 캘리브레이션 주기, 캘리브레이션 경과 시간 등 사용중인 스캐너의 정보를 제공합니다. |
| 클라우드 저장소 | 클라우드의 전체 용량과 사용 중인 용량을 표시합니다.                                  |
| 종합 통계    | 작업 상태에 따른 케이스의 통계를 제공합니다.                                      |
| 주문현황     | 주문 상태에 따른 케이스의 통계를 제공합니다.                                      |
| 그래프      | 기간 별 작업 정보를 제공합니다.                                             |
| 치식 정보    | 설정한 기간 동안의 케이스 수, 스캔 횟수, 스캔 시간 등 각종 정보를 그래프로 표시합니다.            |


## Medit Insights

Medit Insight는 개별 사용자에게 사용 통계 리포트를 제공하는 이메일 서비스입니다.

### 참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- Medit Insights

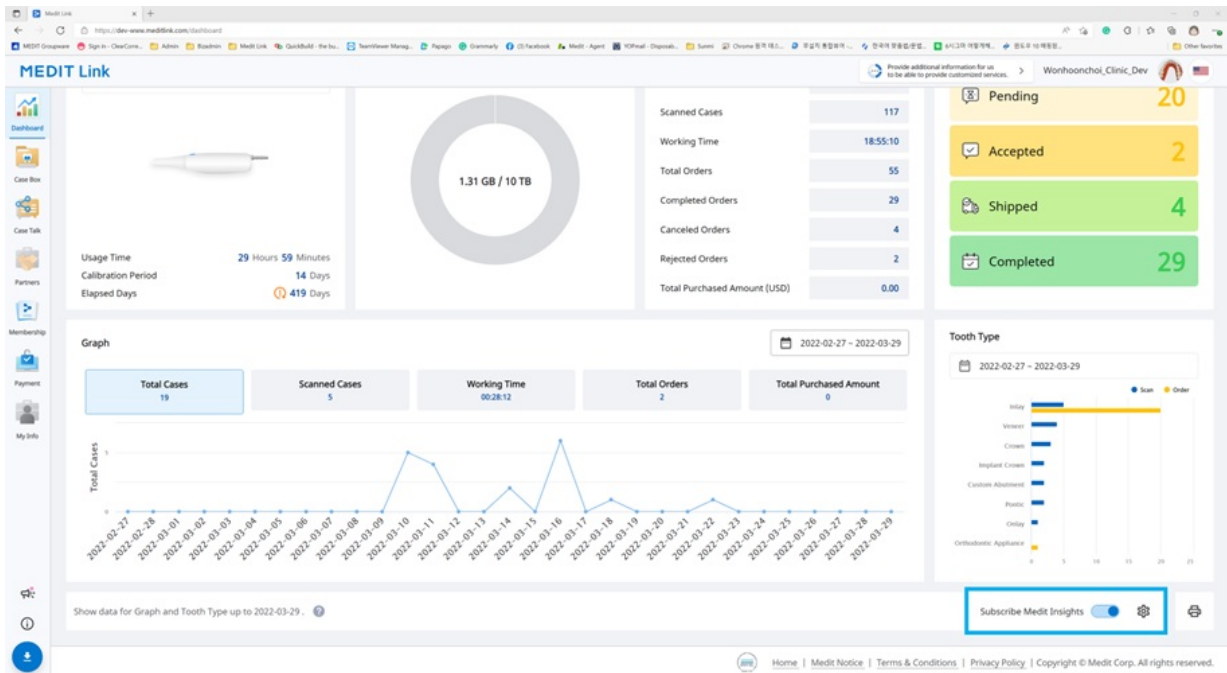

## Medit Insights 구독

통계 리포트는 매월 2일에 이메일로 발송됩니다. 리포트 구독을 위해 별도의 가입은 필요하지 않습니다. 대시 보드 화면 하단의 **"Medit Insights 구독"**을 활성화하면 리포트 발송을 요청할 수 있습니다.

Medit Link 계정이 아닌 다른 이메일로 리포트를 받으려면 **Medit Insights** 구독 우측의 설정 버튼을 클릭하여 이메일 주소를 별도로 설정할 수 있습니다.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account
 ☐ Another email address


The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

21

구독 중인 사용자에게는 다음과 같은 사용자 통계 리포트가 매달 2일 발송됩니다.

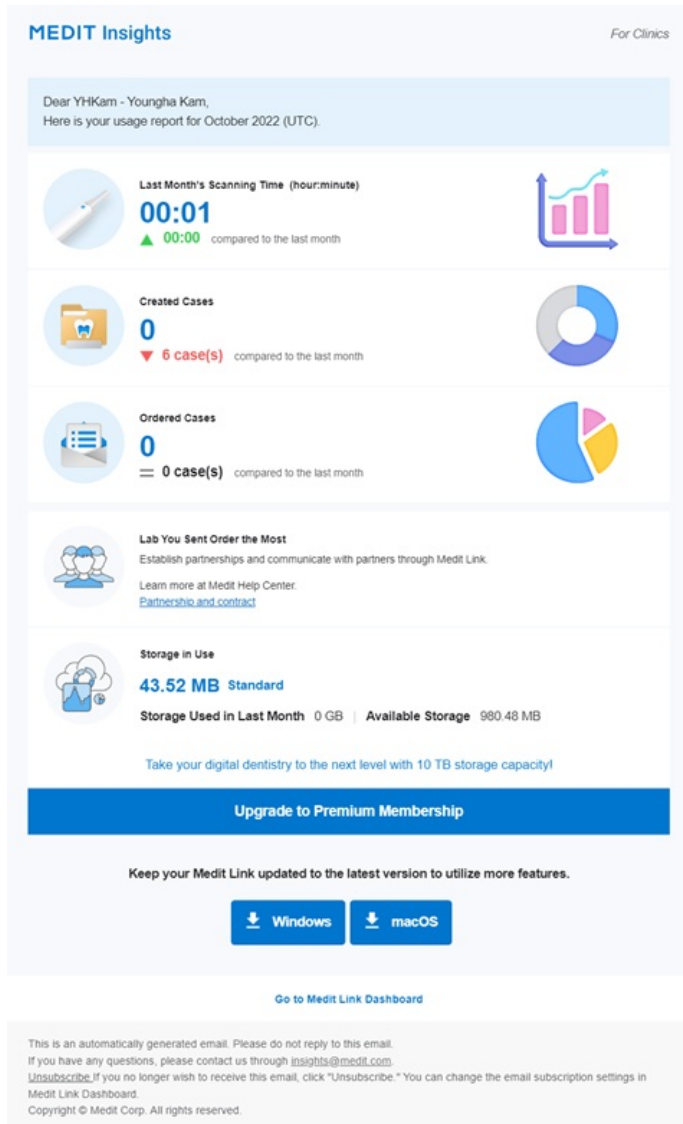


|                        |                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 배너                     | <b>Medit</b> 가 제공하는 유용한 정보를 수신합니다.<br>배너를 받고 싶지 않은 경우, <b>My Info &gt; 내 정보 &gt; 회사 정보</b> 하단에 위치한 마케팅 및 프로모션 동의 항목을 체크 해제한 후에 “저장”을 클릭합니다. |
| 통계 정보                  | 스캔 시간, 케이스 생성 수, 가장 많이 주문한 랩 등 사용자의 사용 이력을 반영한 통계를 표시합니다.                                                                                   |
| <b>Medit Link</b> 업데이트 | <b>Medit Link</b> 최신 버전의 다운로드 링크를 제공하여 바로 업데이트할 수 있습니다.                                                                                     |
| <b>Dashboard</b>       | <b>Medit Insights</b> 에서 제공하는 모든 통계 정보는 <b>Dashboard</b> 를 기반으로 합니다. <b>Dashboard</b> 로 이동하여 보다 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.                         |

## Medit Insight 이메일 수신 해제하기

**Dashboard**에서 “**Medit Insights** 구독”을 비활성화 하거나, 수신한 이메일에서 “구독 해지”를 클릭하여 이메일 수신을 중지할 수 있습니다.

## Case Box/Work Box


**Order Box** (치과) 또는 **In Box**(기공소)에서는 **Medit Link** 어플리케이션에서 생성한 모든 케이스를 표시합니다. 별도의 프로그램을 설치하지 않고 인터넷 브라우저를 통해서 모든 케이스를 확인할 수 있습니다.

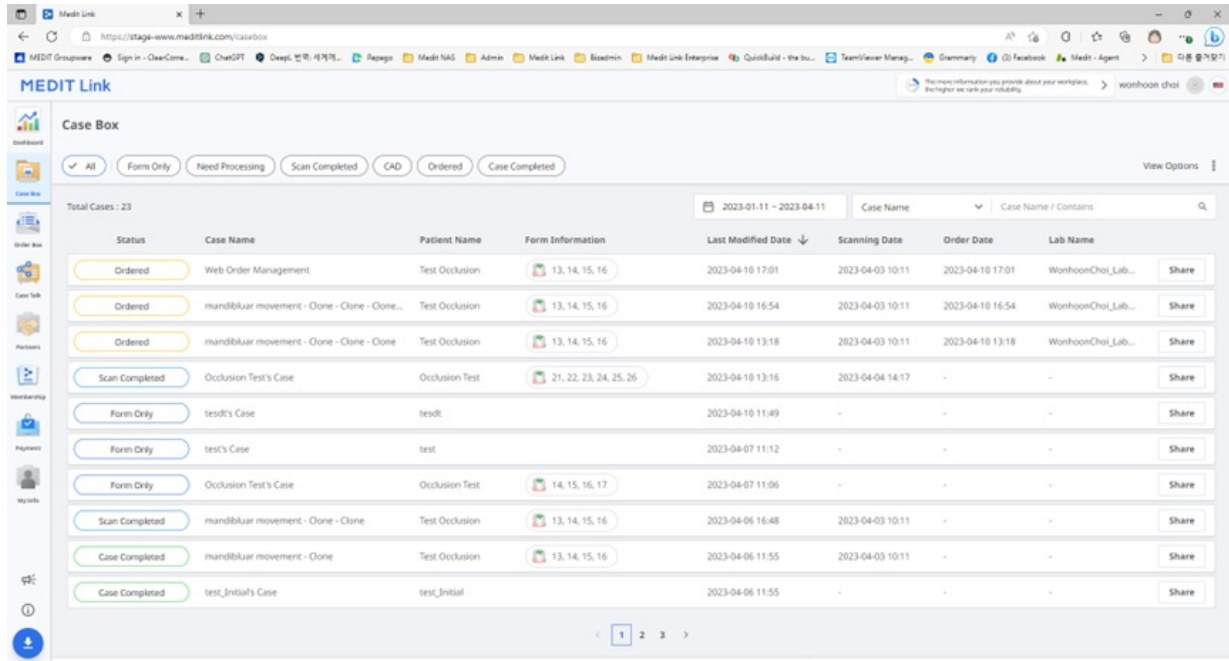

## 케이스 필터링

### 상태를 이용한 필터링

상태에 따라 케이스를 필터링할 수 있는 기능을 제공합니다.

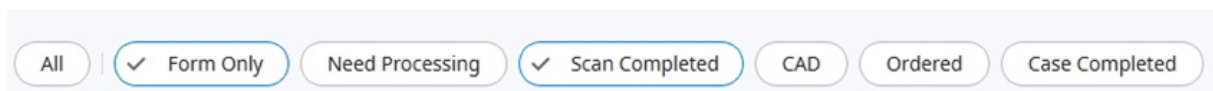

- 클릭하여 선택한 상태에 해당하는 케이스만 표시할 수 있습니다. 선택된 상태의 케이스만 브라우저에 표시됩니다.
- 한 번에 여러 개의 상태를 선택할 수 있습니다.

계정 종류에 따라 다음 기능이 제공됩니다.

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Case Box</b> (클리닉 계정) | All / Form Only / Need Processing / Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed |
| <b>Work Box</b> (기공소 계정) | All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done                         |

### 기간 설정을 이용한 필터링

설정된 기간 내의 케이스를 필터링하여 표시합니다.

1. 기간 설정 필터를 클릭합니다.



2. 목록에서 원하는 기간을 선택합니다.

Last 30 Days

From

2020-08-21

To

2020-09-20

- 전체: 모든 케이스를 표시합니다.
- 직접 설정: 시작 날짜와 종료 날짜를 지정하면 이 기간 내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 오늘: 오늘 수정된 케이스를 표시합니다.
- 어제: 어제 수정된 케이스를 표시합니다.
- 최근 7일: 오늘을 제외한 7일 이내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 최근 30일: 오늘을 제외한 30일 이내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 최근 90일: 오늘을 제외한 90일 이내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 이번 달: 이번 달에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 지난 달: 지난 달에 수정된 케이스를 표시합니다.

케이스 목록은 선택한 기간 내에 생성되거나 마지막으로 수정된 케이스를 실시간으로 반영합니다.

## 검색 기능을 이용한 필터링

검색 기능을 활용하여 빠르게 원하는 정보를 표시합니다.


Case Name

Case Name / Contains

각 **Box**에 따라 다음과 같은 검색 옵션을 제공합니다.

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Case Box</b><br>(클리닉 계정) | 케이스 이름, 환자 이름, 환자 ID, 기공소 이름 |
| <b>Work Box</b> (기공소 계정)    | 케이스 이름, 환자 이름, 치과 이름, 주문 ID  |

## 케이스 상세 정보

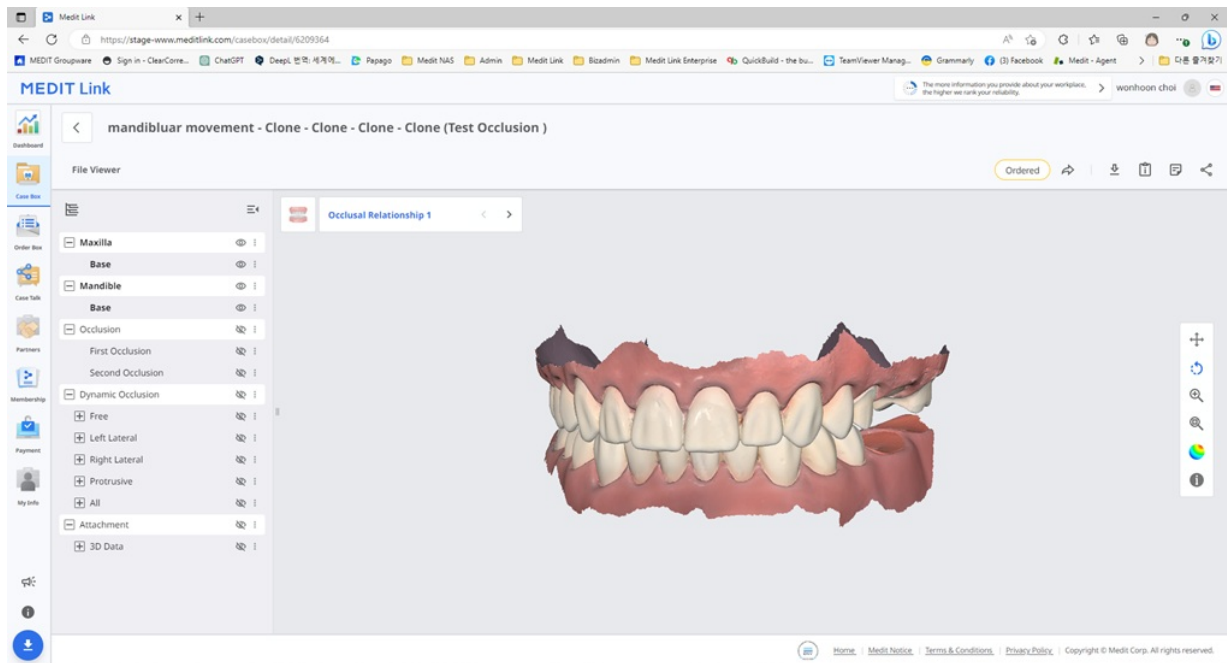

Case Box/Work Box에서는 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

|  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 케이스 상태  | 케이스의 상태를 표시합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 상세정보 보기 | 케이스의 상세 정보를 보기 위해 <b>Box</b> 를 이동합니다. ( <b>Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box</b> ).                                                                                                                                                                                                            |
|  | 다운로드    | 케이스에 포함된 파일을 로컬 <b>PC</b> 에 다운로드합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 케이스 정보  | 케이스 정보를 확인하고 <b>PDF</b> 로 저장하거나 프린트합니다.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 메모 & 태그 | 케이스 등록/주문 시 입력한 메모/태그를 표시합니다. 주문 과정에서 메모는 포함되며 케이스에 관한 더 자세한 정보를 공유할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 공유      | <p>케이스를 공유하기 위한 공유 링크를 생성합니다.<br/>공유된 링크에 접속한 사용자는 별도의 프로그램 설치 없이 <b>Chrome, Firefox, Safari</b> 와 같은 인터넷 브라우저를 이용해 간단하게 <b>3D</b> 데이터를 확인할 수 있습니다.</p> <p><b>Medit Link</b>의 웹페이지에서 생성된 링크의 공유 범위, 접근 권한 등을 설정하여 링크에 접근할 사용자를 제한할 수 있습니다. 개인 정보를 보호하기 위해 <b>PIN</b> 코드나 링크 기한 만료일을 설정할 수도 있습니다.</p> |

## Order Box/In Box

**Order Box** (치과) 또는 **In Box**(기공소)에서는 **Medit Link** 어플리케이션에서 주문한 케이스를 표시합니다.

### 주문 탭

- |   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 케이스 이름과 환자 이름을 표시합니다.                                              |
| 2 | 주문 수락/취소, 배송/수령 등 주문 관리를 위한 기능을 제공합니다.                             |
| 3 | 사용 가능한 탭을 보여줍니다. (주문, 파일 뷰어)                                       |
| 4 | 케이스 상태, 상세 정보, 케이스 정보, 메모 및 태그 등의 기능을 제공합니다.                       |
| 5 | 주문 ID, 환자 이름, 거래처 이름, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 배송 날짜, 메모 등 주문 상세 정보를 표시합니다. |
| 6 | 주문한 상품 정보, 배송 정보를 표시합니다.                                           |


### Order Box/In Box에서 제공하는 탭

| 주문                                                                                             | 파일 뷰어                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주문 ID, 환자 이름, 거래처 이름, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 배송 날짜, 메모, 태그 및 주문한 상품에 대한 정보 등 주문 관련 상세 정보를 확인할 수 있습니다. | 스캔이나 <b>CAD</b> 등을 통해 생성된 결과 파일을 확인할 수 있습니다.<br>사용자가 첨부하거나 각 프로그램으로부터 획득한 <b>3D</b> 데이터나 이미지를 표시하고 관리할 수 있는 기능을 제공합니다. |

## Case Talk

**Medit Link** 어플리케이션에서 생성한 케이스를 불특정 다수, 특정 인원, **Medit Link** 구성원에게 공유할 수 있습니다.

**Case Talk**을 통해 **Medit Link**의 웹과 앱에서 공유된 케이스의 리스트를 확인할 수 있습니다.

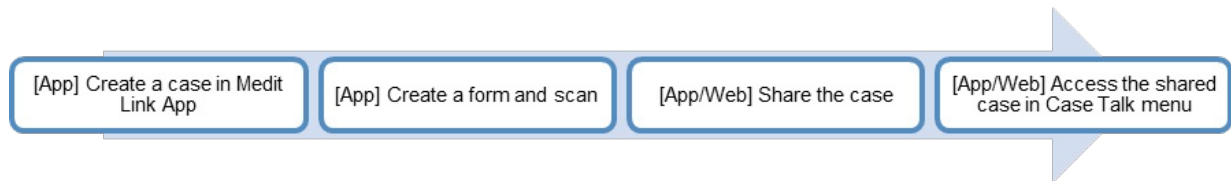


공유한 케이스는 별도의 프로그램 설치 없이 인터넷 브라우저에서 확인 가능하기 때문에 인터넷 사용이 가능한 **PC**, 노트북, 스마트폰, 태블릿 등의 기기에서 쉽게 **3D** 스캔 데이터를 확인하고 커뮤니케이션할 수 있습니다.


### Case Talk 생성하기

**Medit Link** 어플리케이션에서 생성한 케이스로부터 공유 링크를 생성합니다.

1. 공유하고 싶은 케이스를 선택하고 우측의 "공유" 버튼을 클릭합니다.

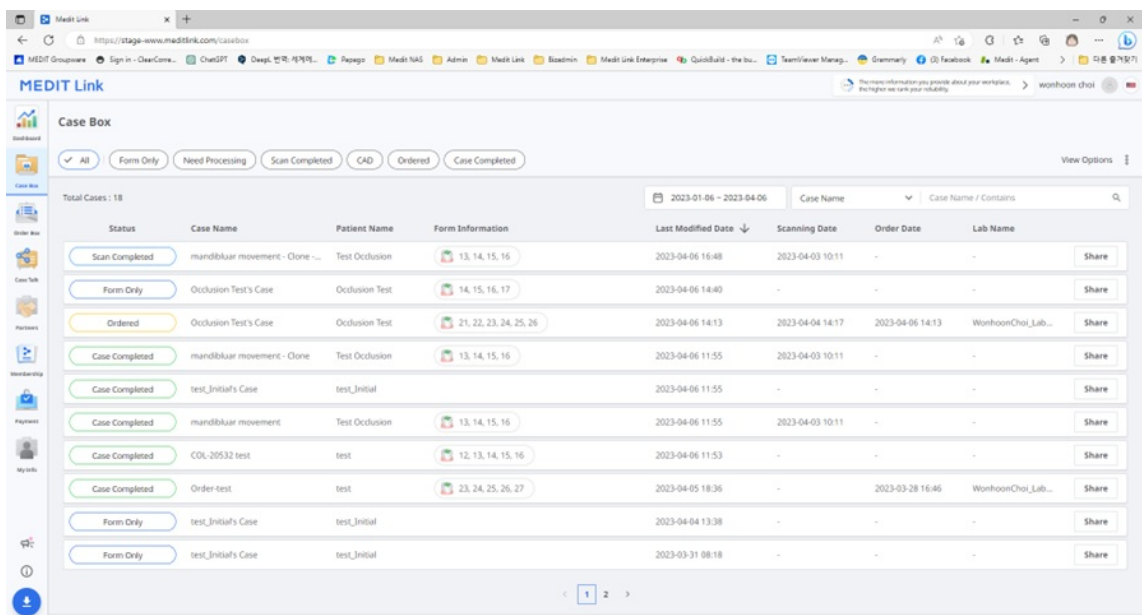

2. 공유하고 싶은 파일을 선택합니다.

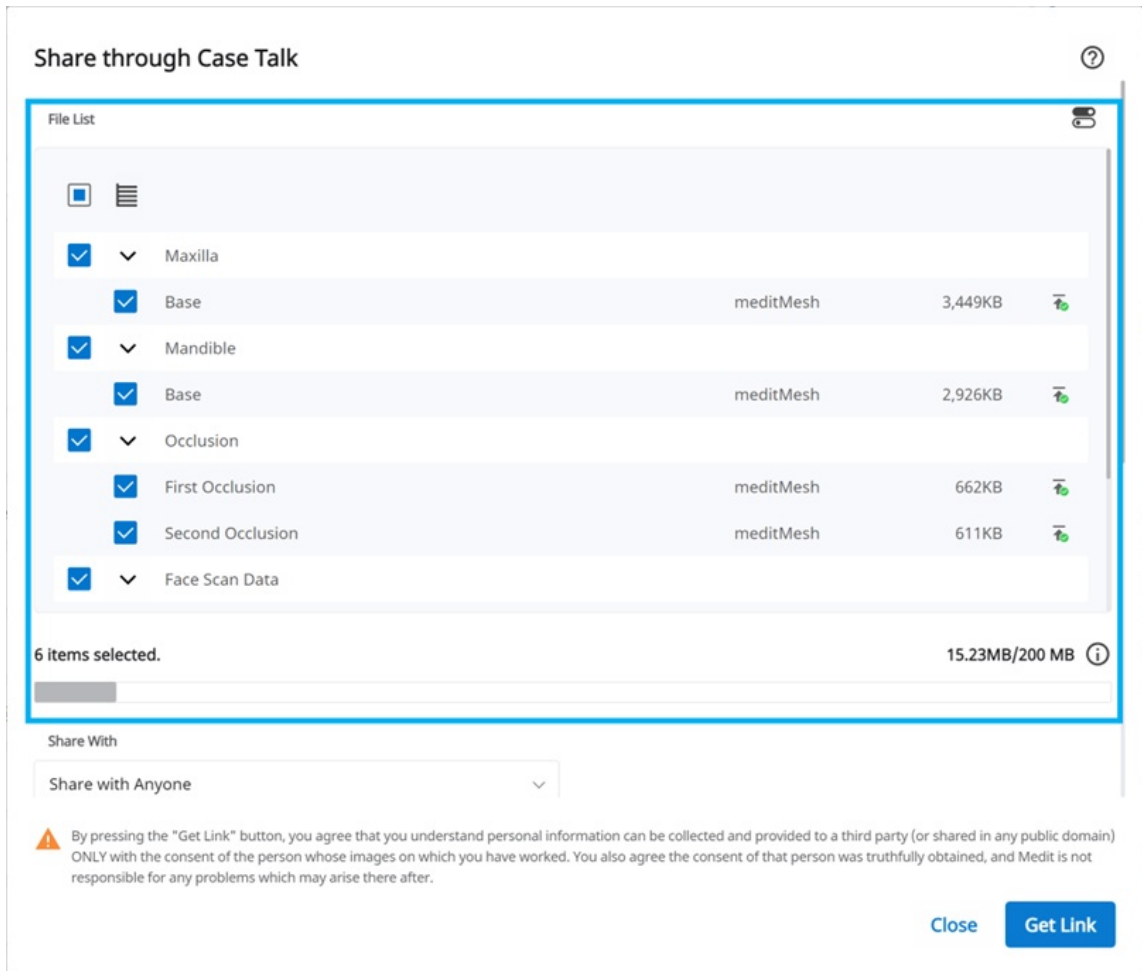

3. 공유 대상 및 공유 옵션을 선택합니다.
4. "링크 생성"을 클릭하여 공유 링크를 생성합니다.

## 공유 범위 및 권한 설정

Share through Case Talk

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

Share the patient's name

Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close
Get Link

Share via

PIN Code

☐ PIN Code
Enter PIN Code


Set the PIN code using six digits for privacy protection.

|            |                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공유 대상      | <ul style="list-style-type: none"> <li>모두에게 공유<br/>공유 링크를 생성합니다. 생성한 링크를 모두에게 공유합니다.</li> <li>특정 사람에게 공유<br/>공유 링크를 생성하고, 생성한 링크를 특정 사람에게 공유합니다.</li> </ul>   |
| 공유 방법      | <p>“특정 사람에게 공유”를 선택하면, 여러가지 방법을 이용해 지정한 사람에게 공유 링크를 전달할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>이메일 주소</li> <li><b>SMS</b></li> <li>파트너</li> </ul> |
| 만료 날짜      | 공유 링크의 만료 날짜를 설정합니다. 링크가 만료된 후, 해당 링크에 접속을 할 수 없습니다. 현재 날짜로부터 최대 <b>90일</b> 까지 만료 날짜를 연장할 수 있습니다.                                                             |
| PIN 코드     | 보안을 위해 <b>6자리</b> 의 PIN 번호를 설정해 주세요.                                                                                                                          |
| 환자 이름 공유   | 이 옵션을 사용하면 공유 링크에 접속한 모든 사용자에게 환자 이름이 공개됩니다.                                                                                                                  |
| 다운로드 권한 부여 | 이 옵션을 선택한 경우, 공유 링크에 접속하는 모든 사용자가 파일을 다운로드 받을 수 있습니다.                                                                                                         |
| 코멘트 허용     | <ul style="list-style-type: none"> <li>이 옵션을 선택하면 공유 링크를 통해서 커뮤니케이션 할 수 있습니다.</li> <li>이 옵션을 사용하지 않으면 공유 링크에 접속한 사용자는 코멘트 및 주석 확인만 가능합니다.</li> </ul>          |
| 코멘트        | 공유 받을 사람에게 전달할 메시지를 입력합니다.                                                                                                                                    |

29

## Case Talk 상세

공유 링크의 파일을 확인합니다. 케이스 상세 화면에서 다음 기능을 제공합니다.

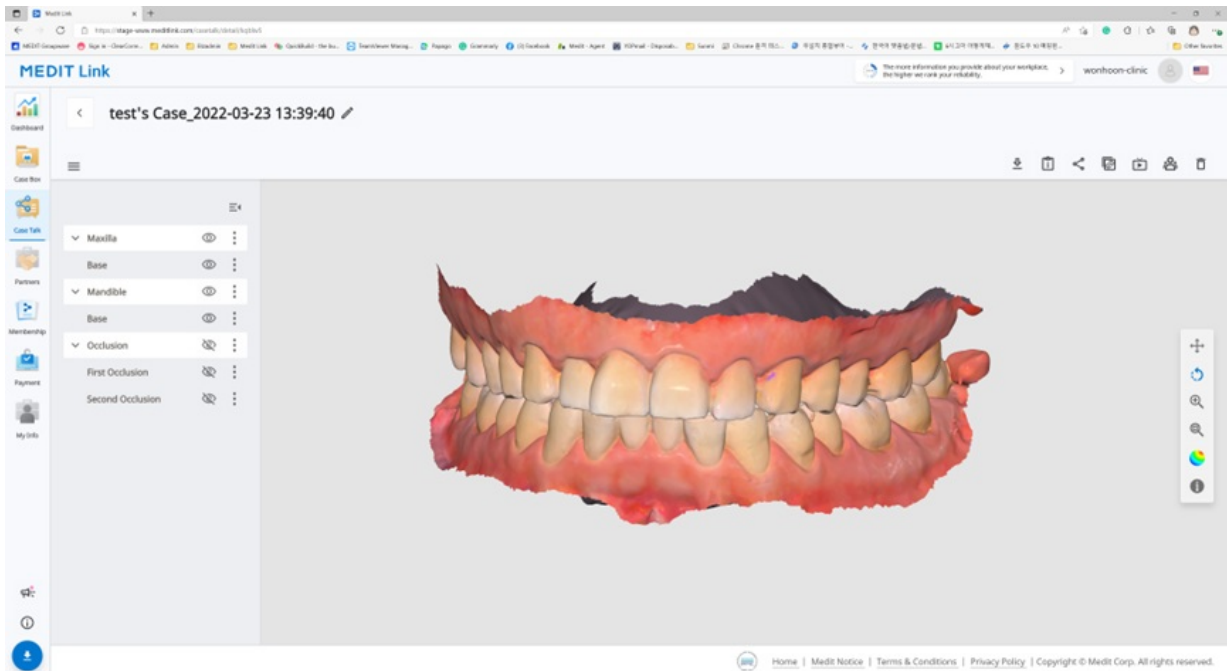

|  |        |                                                        |
|--|--------|--------------------------------------------------------|
|  | 다운로드   | 케이스에 포함된 파일을 로컬 PC에 다운로드합니다.                           |
|  | 케이스 정보 | 케이스의 상세 정보를 제공합니다.                                     |
|  | 공유     | 공유 설정을 변경합니다.                                          |
|  | 링크 복사  | 공유 링크를 클립보드로 복사합니다. 인터넷 브라우저를 이용해 공유 아이টে을 확인할 수 있습니다. |
|  | 라이브    | 연결된 사용자와 화면을 공유합니다.<br>공유된 화면은 연결된 모든 사용자와 동기화 됩니다.    |
|  | 참가자    | 링크에 접속한 모든 사용자를 표시합니다.                                 |
|  | 삭제     | 공유 링크를 삭제합니다. 더 이상 공유 링크에 접속할 수 없게 됩니다.                |

### 참고


Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 라이브
- 참가자

## 웹 뷰어

Case Talk에서 공유된 데이터를 인터넷 브라우저를 이용해 확인합니다.

주석, 코멘트 기능을 사용하여 링크에 접속한 사용자와 커뮤니케이션이 가능합니다.

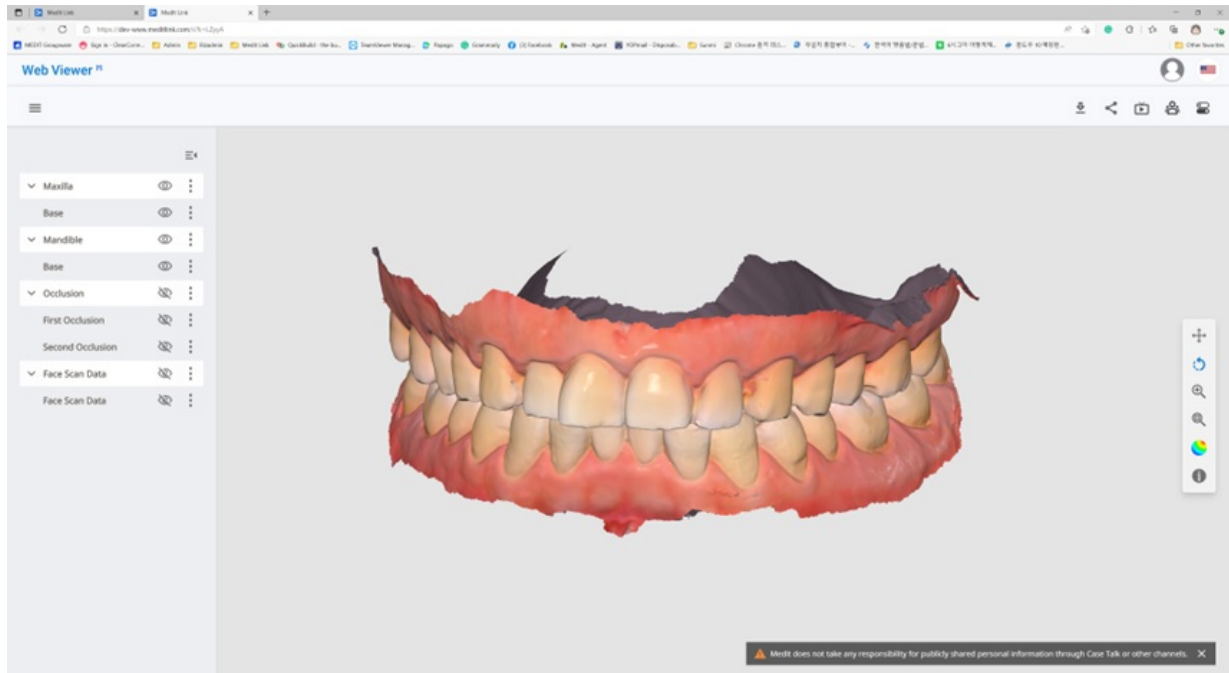

|                                                                                     |        |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|    | 다운로드   | 케이스에 포함된 파일을 로컬 <b>PC</b> 에 다운로드합니다.                   |
|    | 케이스 정보 | 케이스의 상세 정보를 제공합니다.                                     |
|  | 공유     | 공유 설정을 변경합니다.                                          |
|  | 라이브    | 화면을 링크에 접속한 사용자와 공유합니다.<br>링크에 접속한 모든 사용자에게 화면이 공유됩니다. |
|  | 참가자    | 링크에 접속한 모든 사용자를 표시합니다.                                 |
|  | 치아 라벨링 | 치아 번호 표시 방법을 선택합니다.                                    |


#### 참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 라이브
- 참가자

주석

3D 모델의 지정 위치에 주석을 추가할 수 있습니다. 추가한 주석은 링크에 접속한 모든 사용자가 확인할 수 있습니다.

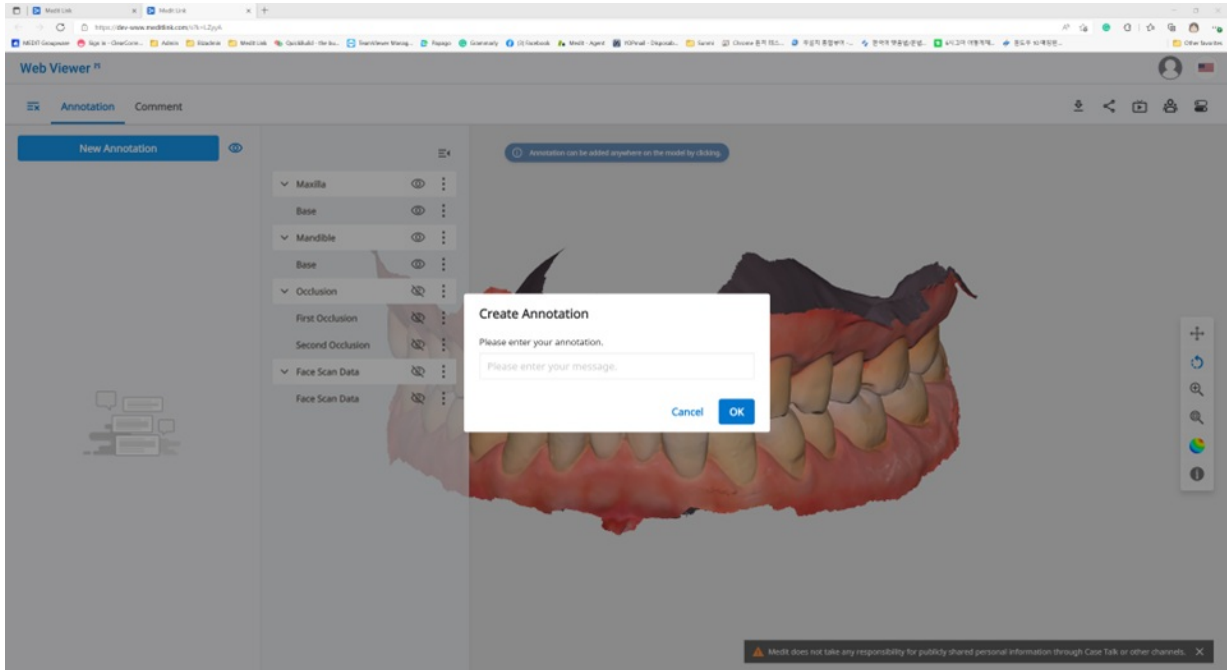

#### 참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 어노테이션

1. 좌측 상단의 메뉴에서 "어노테이션" 탭을 클릭합니다. "어노테이션 추가"를 클릭합니다. 3D 모델의 특정 위치를 클릭하면 다음 화면이 표시됩니다.
2. 전달하고 싶은 내용을 입력한 후 "확인"을 클릭합니다.

### Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel
OK

3. 주석을 이용해 간단한 의견 교환이 가능합니다. 생성된 주석에 답장을 입력하고 "전송" 할 수도 있습니다.

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi
🗑️ ✕

Annotation 1

**1** 09-09 20:31

Please enter your reply

Send

#### 코멘트

코멘트 기능을 이용해 링크에 접속한 사용자와 커뮤니케이션이 가능합니다.

#### 참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 코멘트

## 실시간 화면 공유


케이스를 공유한 사용자가 자신이 보는 화면을 접속한 사용자와 실시간으로 공유할 수 있습니다.

#### 참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 라이브

1. "라이브" 버튼을 클릭하면 다음 화면이 표시됩니다.

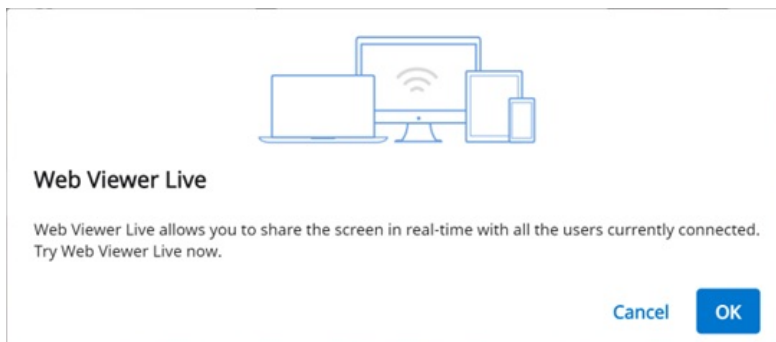


2. "확인"을 클릭하여 화면 공유를 시작합니다.
3. 공유 링크에 접속한 다른 사용자들이 화면 공유를 수락합니다.
4. 화면 공유를 요청한 사용자의 화면이 요청을 받은 사용자의 화면과 동기화되어 표시됩니다.

## 데이터 트리





데이터를 속성에 따라 그룹화하여 표시합니다. 데이터 보기/숨기기, 불투명도 조정 등을 수행할 수 있습니다.

### 데이터 트리 메뉴
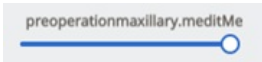
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 보이기/숨기기 | 눈 모양 버튼을 클릭하여 데이터 보이기 또는 숨기기합니다. 데이터 그룹 또는 개별 데이터를 보이기/숨기기 할 수 있습니다.                                                                                                                                                                              |
| 불투명도    | <p>요소에 마우스를 가져가면 불투명도를 조정할 수 있는 슬라이더바가 표시됩니다.</p> <p>슬라이드바를 우측으로 이동할수록 데이터의 불투명도가 올라가 데이터가 더 선명하게 보이고, 슬라이드바를 좌측으로 이동할수록 데이터의 불투명도가 낮아져 데이터가 더 투명하게 보입니다.</p>  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 확장 메뉴 | <p>요소의 오른쪽에 확장 메뉴를 제공합니다. 확장 메뉴는 다음 항목을 포함합니다.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 이 요소만 표시: 다른 데이터를 모두 숨기고 현재 데이터만 표시합니다.</li> <li>• 숨기기: 현재 데이터를 숨기기 상태로 변경합니다.</li> <li>• 복제: 데이터를 복사하여 <b>Attachment</b> 그룹에 동일한 데이터를 추가합니다.</li> <li>• 내보내기: 선택한 파일을 로컬 <b>PC</b>로 내보내기 합니다.</li> <li>• 삭제: 데이터를 삭제합니다.</li> </ul> |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3D 모델 조정
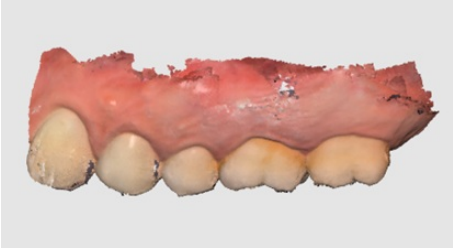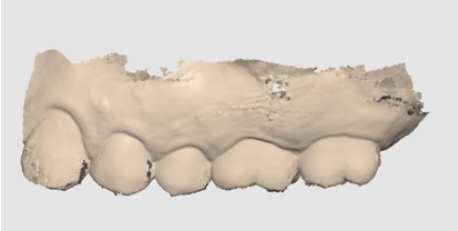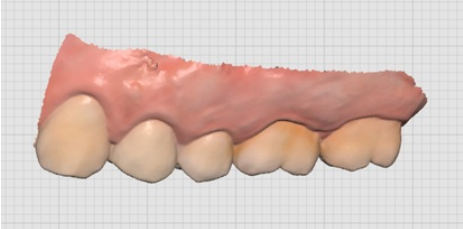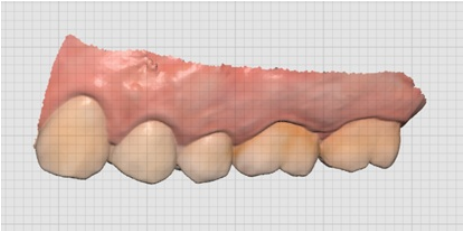
|                                                                                     |             |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 이동          | 모델을 이동합니다.                                                                                                                       |
|    | 회전          | 모델을 회전합니다.                                                                                                                       |
|    | 확대/축소       | 모델을 확대/축소 합니다.                                                                                                                   |
|    | 화면 맞춤       | 모델이 화면 전체에 보이도록 자동 조정합니다.                                                                                                        |
|  | 모델 보기 방법    | <p>텍스처 켜</p> <p>스캔 데이터를 색상 정보와 함께 표시합니다.</p>  |
|  |             | <p>텍스처 끄</p> <p>스캔 데이터를 색상 정보 없이 표시합니다.</p>  |
|  | 그리드 설정 (mm) | <p>그리드 켜기</p> <p>배경에 그리드를 표시합니다.</p>         |
|  |             | <p>오버레이 그리드 켜기</p> <p>그리드를 모델 위로 표시합니다.</p>  |



그리드 끄기

그리드를 숨깁니다.

## 파트너

등록된 업체를 검색해서 파트너십을 요청하거나, 현재 파트너십을 맺거나 계약을 체결한 파트너의 목록을 확인 할 수 있습니다.


### 참고

Medit Link China는 Google 지도를 이용하는 서비스를 제공하지 않습니다.

## 파트너 검색

업체 이름, 주소를 기반으로 **Medit Link**에 가입되어 있는 사용자를 검색해서 표시합니다.

검색한 결과에서 계약을 원하는 업체에 파트너십을 요청할 수 있습니다.

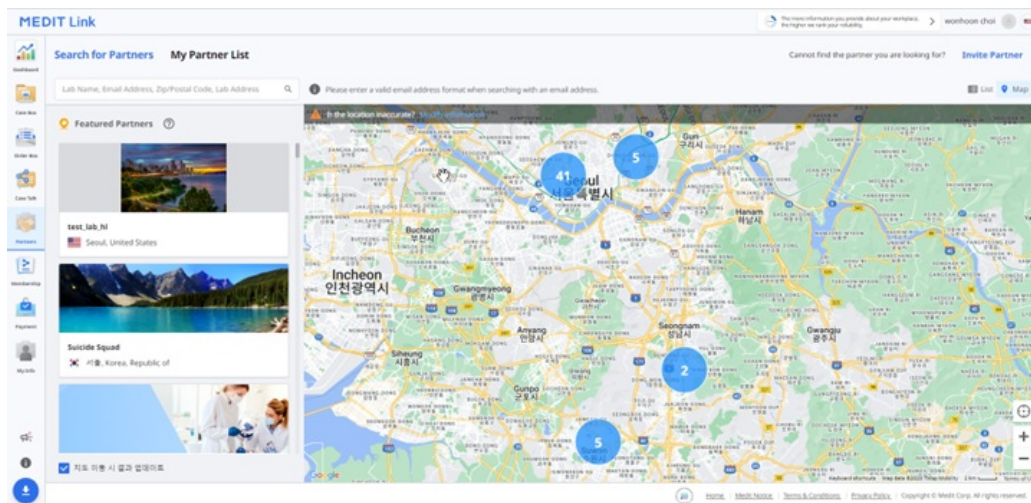


## 내 파트너 목록

현재 파트너십을 맺은 업체와 계약을 맺은 업체 목록을 표시합니다.

### 파트너십과 계약의 차이점

업체와 파트너십 관계인 경우 "계약 요청"을 할 수 있습니다.

- 계약 관계인 업체와는 가격을 기반으로 한 주문이 가능합니다.

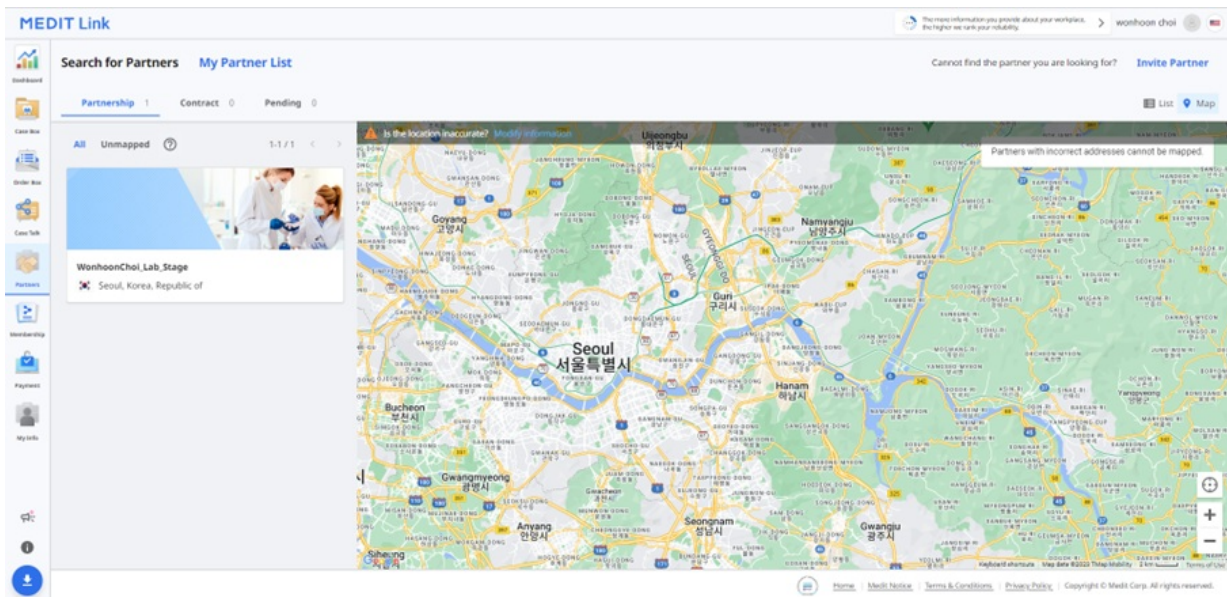

## 참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 계약

## 파트너 초대

Medit Link의 회원이 아닌 사용자에게 가입 요청과 함께 파트너십 요청을 진행할 수 있습니다. "파트너 초대"를 클릭하면 다음과 같은 화면이 표시됩니다.

1. 파트너 초대"를 클릭하면 다음과 같은 화면이 표시됩니다.
2. 파트너십을 요청하고자 하는 업체의 이메일 주소를 입력 후 초대 메일을 전송하여 초대를 진행합니다.



### Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Email Address

Cancel
Send Invitation

3. 초대를 받은 업체에서 확인 후 회원 가입을 진행하면 파트너십이 맺어지고, Medit Link 서비스를 사용할 수 있습니다.

## 멤버십

**Medit Link**는 클라우드 플랫폼을 기반으로 디지털 환경 구축을 지원할 수 있도록 멤버십 서비스를 제공합니다.

커머스 등 다양한 서비스를 점진적으로 확장하여 고객에게 보다 일관되고 개인화된 경험을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

멤버십 서비스는 다음과 같은 플랜을 제공합니다.

### 스탠다드

- 모든 회원에게 제공되는 무료 플랜
- **1 GB**의 클라우드 저장 공간 제공
- **Medit Link**를 처음 시작하는 고객에게 적합

### 프리미엄

- 구독 가입을 통해 제공되는 유료 플랜
- **10 TB**의 대용량 클라우드 저장 공간 제공
- 케이스가 많거나, 다양한 데이터를 저장하는 고객에게 적합
- 가입 후 **1달간** 무료 사용 제공

|                                         | 스탠다드        | 프리미엄            |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------|
| 클라우드 저장소                                | <b>1 GB</b> | <b>10 TB</b>    |
| 요금                                      | 무료          | <b>0.99달러/월</b> |
| * 클라우드 저장 용량에서 <b>Raw data</b> 는 제외됩니다. |             |                 |

### 참고


**Medit Link China**는 멤버십 서비스를 향후에 제공할 예정입니다. 정식 서비스 시작 전까지는 무료로 프리미엄 멤버십을 이용할 수 있습니다.

## 멤버십

The screenshot displays the Medit Link membership interface. On the left, a sidebar contains navigation links: Dashboard, Case Note, Order Note, Case Talk, Payments, and My info. The main content area is divided into two primary sections. The 'My Plan' section on the left features an illustration of a person using a smartphone and a cloud icon, indicating the 'Standard Free' plan. Below this, a list of benefits is provided: 'Free plan for every member', '1 GB of cloud storage', and 'Efficient for new users'. A 'Subscribe' button is located at the bottom right of this section. The 'Cloud Storage' section on the right shows a progress bar indicating 353.21 MB used out of a 1 GB total. It includes a 'Set Period' dropdown menu with options for 'All', '1 Week Ago', '1 Month Ago', '6 Months Ago', and '1 Year Ago'. Below the progress bar, there are two expandable sections: 'Raw Data' (11.97 GB) and 'Result Files & Attachments' (353.21 MB), each with a 'Delete' button. The footer of the dashboard contains links for 'Home', 'Medit Notice', 'Terms & Conditions', 'Privacy Policy', and a copyright notice for Medit Corp.


## 나의 플랜

좌측에는 현재 구독 중인 플랜을 표시합니다. 언제든지 멤버십을 구독/구독 취소할 수 있습니다.

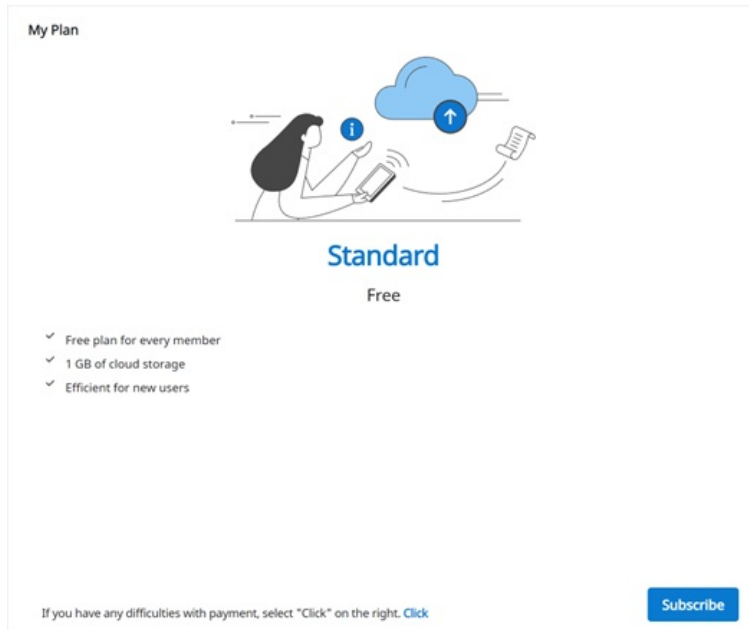

## 클라우드 저장소

우측에는 클라우드 스토리지를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

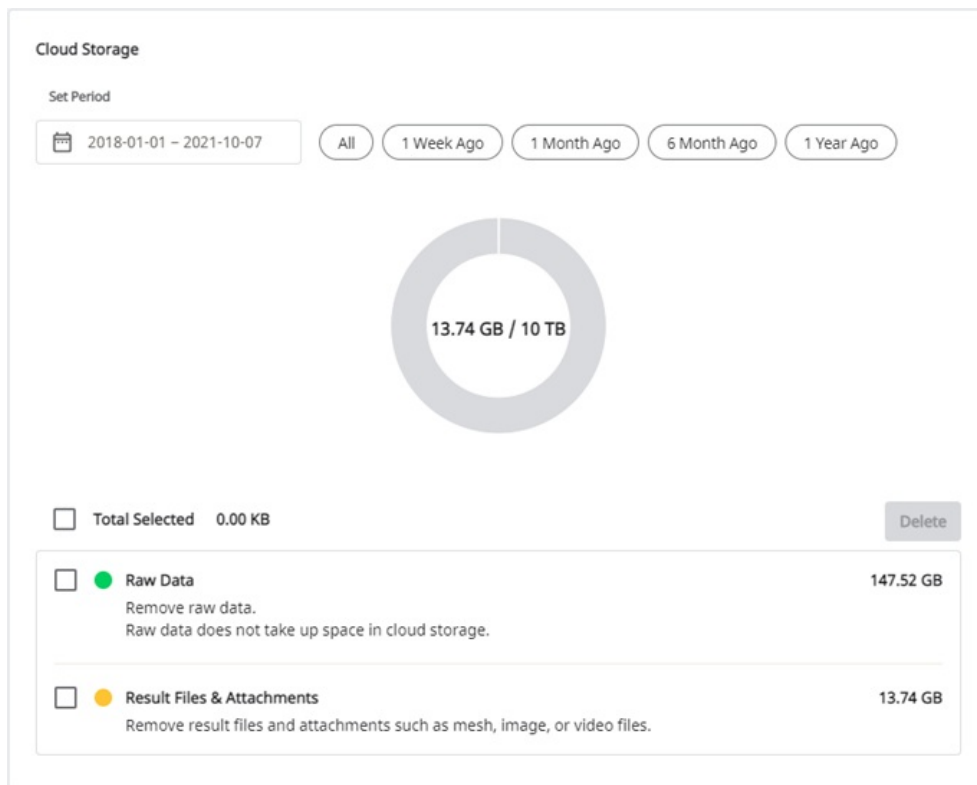

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기간 설정  | <p>기간을 설정하면 설정한 기간 내의 데이터가 삭제 대상이 됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전체: 모든 데이터를 표시합니다.</li> <li>• 일주일 전: 생성 후 1주일이 경과한 데이터를 표시합니다.</li> <li>• 1개월 전: 생성 후 1개월이 경과한 데이터를 표시합니다.</li> <li>• 6개월 전: 생성 후 6개월이 경과한 데이터를 표시합니다.</li> <li>• 1년 전: 생성 후 1년이 경과한 데이터를 표시합니다.</li> </ul> |
| 원본 데이터 | <p>원본 데이터는 클라우드 스토리지 용량을 사용하지 않아, 그래프에 표시되지 않습니다. 개인 정보 보호 등의 이유로 클라우드 스토리지에서 원본 데이터를 관리하고 싶은 경우 사용할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                |


|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 결과 및 첨부 파일 | 결과 및 첨부 파일은 클라우드 스토리지의 용량을 사용합니다. 클라우드 스토리지 용량이 가득 찼을 경우, 사용하지 않는 데이터를 삭제하여 용량을 확보할 수 있습니다. |
| 삭제         | 선택한 데이터를 클라우드로부터 삭제합니다.                                                                     |

## 멤버십 구독하기


멤버십에 가입하지 않았거나, 리딩 코드를 이용해 프리미엄 플랜을 사용하는 경우 구독하기를 통해 멤버십에 가입할 수 있습니다.

멤버십 가입을 위한 결제는 **Stripe** 서비스를 통해 진행됩니다. ([www.stripe.com](http://www.stripe.com))

1. “구독하기”를 클릭합니다.

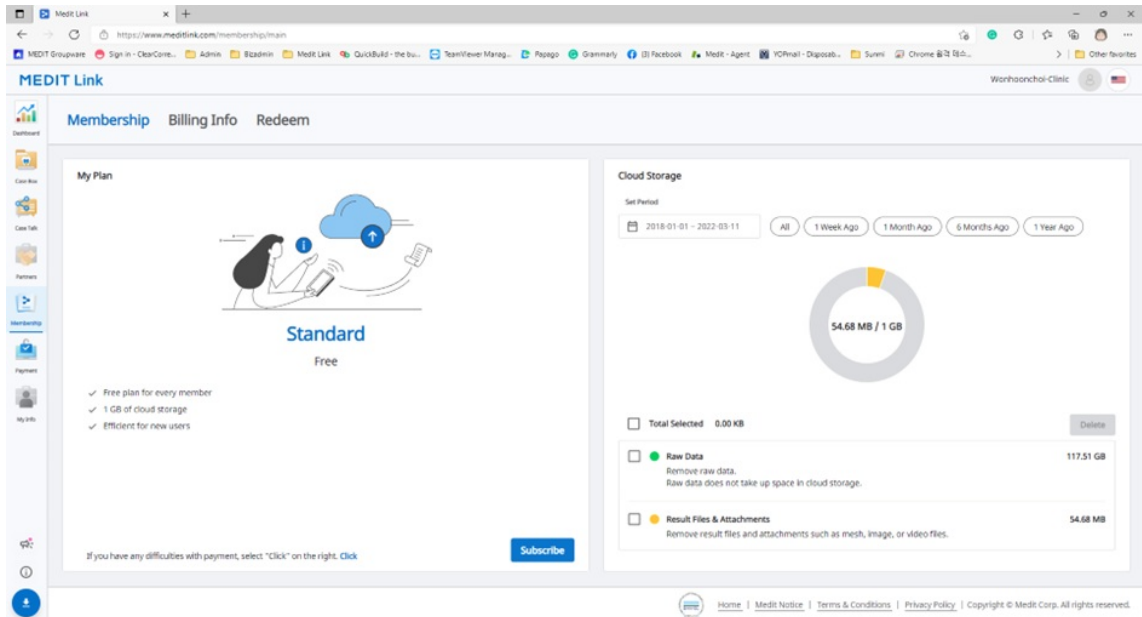

2. 플랜에 대한 내용을 확인후 “구독하기”를 클릭합니다.

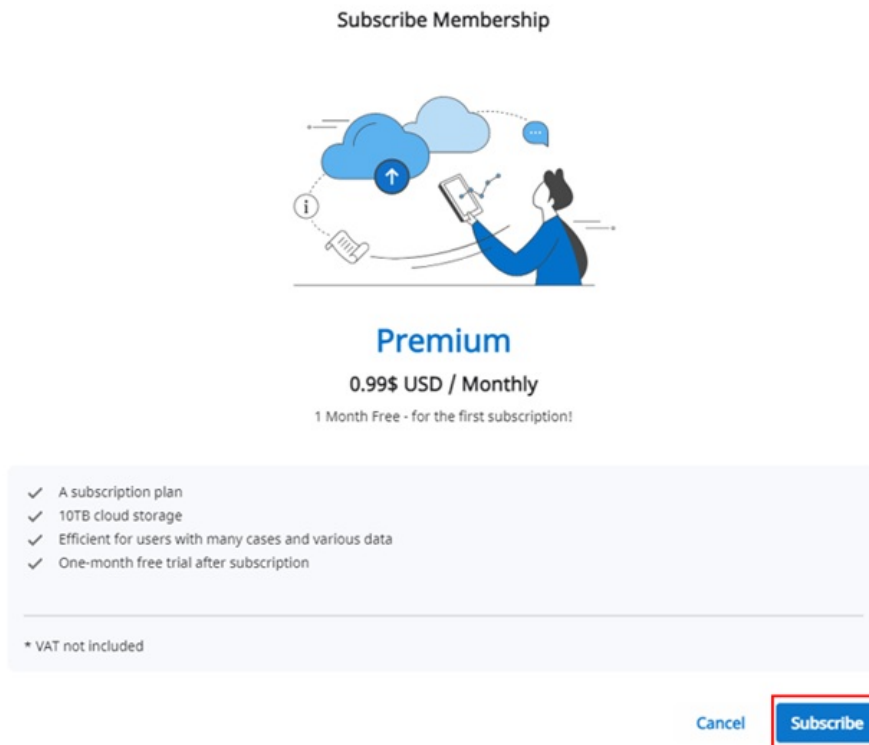

3. 가격 및 조건을 확인 후 결제 정보를 입력합니다. "구독하기"를 클릭하여 결재를 진행합니다.

Subscribe to Premium membership for Clinic

**\$0.00**

Then \$0.99 per day

Medit Link Membership

Premium membership for Clinic \$0.99

Billed daily

Subtotal \$0.99

1 MONTH FREE – for first subscription -\$0.99

100% off for a day

Total due today \$0.00

Powered by stripe | Terms Privacy

## Pay with card

Email

Card information

1234 1234 1234 1234



MM / YY

CVC

Name on card

Country or region

South Korea



☐ Save information to pay faster next time



Subscribe

By confirming your subscription, you allow MEDIT SG PTE. LTD. to charge your card for this payment and future payments in accordance with their terms.

4. 결제가 완료될 때까지 창을 닫지 말고 잠시 기다려 주세요. 결제가 완료되면 다음과 같은 메시지가 보여집니다.

### Subscribe Membership



**Payment Successful.**


Invoice

Close


## 멤버십 구독 취소하기

멤버십 서비스를 언제든지 구독 취소할 수 있습니다. 멤버십 서비스가 구독 취소되면 남은 결제 기간 동안 프리미엄 플랜이 유지됩니다. 다음 결제일에 스탠다드 플랜으로 변경되고, 클라우드 스토리지 용량은 **1 GB**로 제한됩니다. 클라우드 스토리지 용량이 꽉 찬 경우, 파일은 백업되지 않고 파일 공유 및 주문은 할 수 없습니다.

1. "구독 취소"를 클릭합니다.

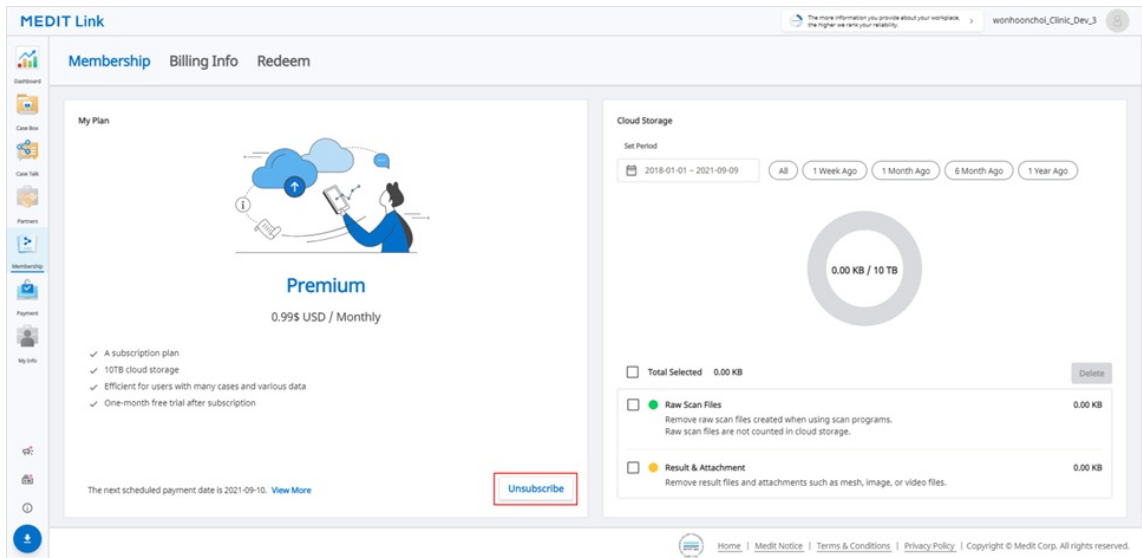

2. 내용을 확인한 후 "구독 취소"를 클릭합니다.

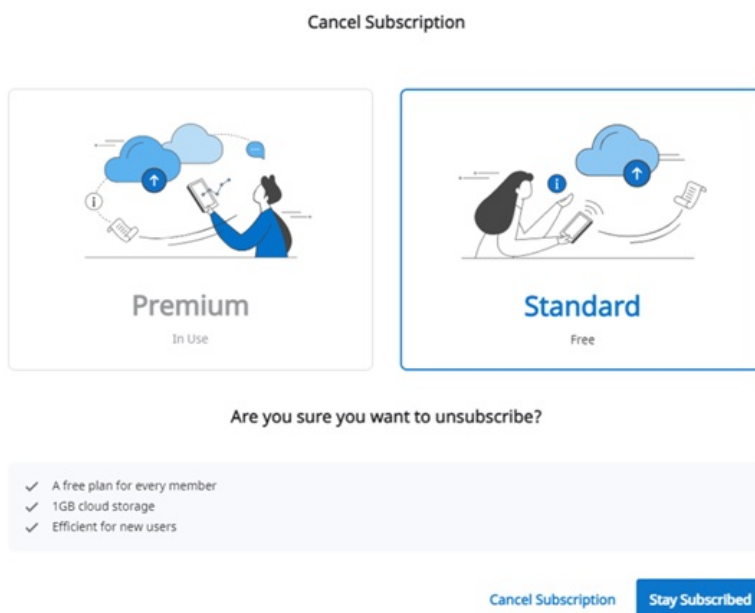

3. 확인 창이 발생하면 "구독 취소"를 한번 더 클릭합니다.

### Confirm Unsubscribe

Your subscription will be canceled at the end of your billing period on 2021-09-10

Cancel Subscription

Stay Subscribed

4. 구독 취소가 완료되었습니다.
5. 다음 결제일에 스탠다드 플랜으로 변경되고, 클라우드 스토리지 용량은 **1 GB**로 제한됩니다. 클라우드 스토리지 용량이 꽉 찬 경우, 파일은 백업되지 않고 파일 공유 및 주문은 할 수 없습니다.

### Confirm Unsubscribe

Your subscription has been canceled.

Your current plan can use up to 2021-09-10. After that, the cloud capacity is limited to 1GB.

If the cloud capacity is exceeded, the files will not be backed up, and the order and share functions will not be available.

Close

## 결제 정보

멤버십 구독 사용자는 각 결제 건에 대한 청구서를 포함한 결제 이력을 확인할 수 있습니다. 필요한 경우 결제 방법을 추가하거나 변경할 수 있습니다. 결제 방법을 변경하는 경우, 다음 결제일부터 변경한 내용이 적용됩니다.

The screenshot shows the 'Billing Info' tab in the MEDIT Link interface. The 'My Plan and Billing Information' section displays the following details:

- Plan: Premium
- Amount: 0.99\$ USD / Monthly
- Next Payment Date: 2021-09-09
- Payment Method: Visa \*\*\*\*\*4242 (11/21) | Stripe | [Edit Payment Method](#)

Below this, a message states: "If you haven't subscribed yet? Experience a differentiated premium."

The 'Billing History' section contains a table with the following data:

| Payment Date | Membership | From       | To         | Payment Amount | Status                            |
|--------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 2021-09-09   | Premium    | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 0.99 \$ (USD)  | <a href="#">Payment Completed</a> |
| 2021-09-09   | Premium    | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 0 \$ (USD)     | <a href="#">Payment Completed</a> |

## 결제 방법 추가

1. "결제 방식 변경"을 클릭합니다

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Edit Payment Method' button in the 'Payment Method' section is highlighted with a red rectangular box to indicate the next step in the process.

2. "Add payment method"를 클릭합니다.

## Billing

### CURRENT PLANS

#### Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

#### Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

### PAYMENT METHOD

VISA \*\*\*\* 4242 Default

Expires 11/2021

+ Add payment method

3. 새로운 결제 정보를 입력한 후 “Add”를 클릭합니다.

## Add payment method

### Card information

Card number MM / YY

☒ Use as default payment method

Add

Go back

By adding a payment method, you agree to MEDIT SG PTE. LTD.'s  
Terms of Service and Privacy Policy.

4. 새롭게 추가한 정보가 기본 결제 방법으로 설정되고, 다음 결제부터 새로운 결제 방법으로 결제가 진행됩니다.

## Billing

### CURRENT PLANS

#### Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

#### Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

### PAYMENT METHODS



Visa \*\*\*\* 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

## 결제 방법 변경

1. Billing 창에서 변경하려는 결제 방법 우측의 "..." 아이콘을 클릭합니다.

## Billing

### CURRENT PLANS

#### Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

#### Premium membership for Clinic

\$0.99 per day

Your plan renews on September 10, 2021.

### PAYMENT METHODS

Visa \*\*\*\* 5556 Default Expires 11/2021 X

Visa \*\*\*\* 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

2. "Make default"를 클릭하면 기본 결제 방법이 변경됩니다.

## Billing

### CURRENT PLANS

**Premium membership for Clinic**  
\$0.99 per day  
Your plan renews on September 10, 2021.

**Premium membership for Clinic**  
\$0.99 per day  
Your plan renews on September 10, 2021.

### PAYMENT METHODS

VISA \*\*\*\* 5556 Default Expires 11/2021 X

VISA \*\*\*\* 4242 Expires 11/2021 ...

+ Add payment method

Make default  
Delete

### BILLING INFORMATION

## 리덤 코드

프로모션을 통해 발급된 리덤 코드를 등록합니다. 리덤 코드를 이용해 프리미엄 멤버십을 사용할 수 있습니다.

### 리덤 코리덤 코드 등록 및 활성화하기

1. 리덤 코드를 입력하고 "등록"을 클릭합니다.

MEDIT Link

Membership Billing Info Redeem

Register Redeem Code

Redeem Code

Register

My Redeem Code

| Promotion                     | Code Number | Dealer Name | Registration Date | From | To | Status |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------|----|--------|
| No search results were found. |             |             |                   |      |    |        |

Home | Medit Notice | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

2. 내용을 읽고 "등록하기" 또는 "적용하기"를 클릭합니다.

- 등록하기: 리딤 코드를 등록합니다. 등록된 리딤 코드는 이후에 활성화하여 사용할 수 있습니다.
- 적용하기: 리딤 코드를 등록하고 활성화합니다. 프로모션이 즉시 적용됩니다.

### Register Redeem Code

You can register for the promotion or apply immediately.  
Register allows you to apply and activate when you need it, If applied immediately, it will start after the expiration of the active promotion.  
Periodic payments are stopped automatically.

Close
Register
Apply

## 리딤 코드 활성화하기

여러 개의 리딤 코드가 등록되어 있는 경우, 원하는 리딤 코드를 활성화하여 사용할 수 있습니다.

### 1. "Activate"를 클릭합니다.

활성화 상태의 리딤 코드가 없는 경우, 선택한 리딤 코드가 바로 활성화됩니다. 활성화 상태의 리딤 코드가 있는 경우, 선택한 리딤 코드는 "Waiting" 상태가 되고 선택한 리딤 코드가 활성화 됩니다. 이전 리딤 코드가 종료되면 "Waiting" 상태의 리딤 코드가 자동으로 다시 활성화됩니다.

### 2. 참고

Waiting 상태의 리딤 코드는 하나만 허용합니다.

The screenshot shows the 'Redeem' section of the Medit Link application. It includes a 'Register Redeem Code' form at the top and a table of 'My Redeem Code' below. The table has columns for Promotion, Code Number, Dealer Name, Registration Date, From, To, and Status. Each row shows a 'Test Promotion - 1 month' with a registered status and an 'Activate' button.

| Promotion                | Code Number | Dealer Name | Registration Date | From | To | Status                     |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|------|----|----------------------------|
| Test Promotion - 1 month | [Redacted]  | Medit Link  | 2021-09-09        | -    | -  | Registered <b>Activate</b> |
| Test Promotion - 1 month | [Redacted]  | Yoshida     | 2021-09-09        | -    | -  | Registered <b>Activate</b> |
| Test Promotion - 1 month | [Redacted]  | Medit Link  | 2021-09-09        | -    | -  | Registered <b>Activate</b> |
| Test Promotion - 1 month | [Redacted]  | Medit Link  | 2021-09-09        | -    | -  | Registered <b>Activate</b> |

## 결제

### 참고


Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 결제정보

### 결제 상세 (치과, 기공소 계정)

Medit Link를 통해 결제를 완료한 항목을 확인할 수 있습니다.

### 대금 지급 계좌 정보 (기공소 계정)

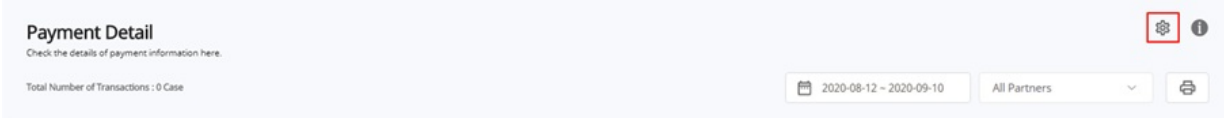

The image shows a 'Payment Detail' interface. At the top, it says 'Payment Detail' and 'Check the details of payment information here.' Below this, it says 'Total Number of Transactions : 0 Case'. On the right side, there are filters for a date range '2020-08-12 ~ 2020-09-10' and a dropdown menu 'All Partners'. There are also icons for settings and information.

기공소 계정의 관리자에게만 제공되는 기능으로, 거래처에서 결제한 대금을 받을 수 있는 정보를 관리합니다.

- 대금 지급 계좌 정보를 입력해야 거래처에서 주문 시 온라인 결제 시스템을 이용할 수 있습니다.

### 참고

Stripe가 지원되는 국가 선택 시에는 Stripe 연결 안내가 발생하며, 해당 버튼을 클릭하면 Stripe 계정을 만들 수 있습니다.

국가를 한국으로 선택하는 경우 결제 대금을 입금받을 수 있는 국내 은행 계좌번호를 입력할 수 있습니다. KCP로 결제 진행이 이루어 집니다.

## 내 정보

### 내 정보

계정 정보에서 회원 가입 시 입력한 가입 정보를 확인하거나 수정할 수 있습니다. 우측의 그룹 정보에서는 소속된 치과 또는 기공소의 회원 정보를 확인할 수 있습니다.

**My Account** My Organization My Scanner My Price List

**Account Information**



1. JPG, GIF, or PNG only. Max size of 10 MB.

Email Address  
coldgreentea@naver.com [Change Email Address](#)

Password  
[Change Password](#)

Name  
wonhoonchoi\_Lab3

Language  
한국어 (대한민국) ▾

Country  
Korea, Republic of ▾

1. Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.

**Subscription Information** [Subscribe](#)

**Standard**

**Organization Information** [Edit Information >](#)

Organization Name  
wonhoonchoi\_Lab3

### 내 회사 정보 (관리자 계정)

로그인한 사용자가 소속된 치과 또는 기공소에 대한 정보를 확인하거나 수정할 수 있습니다. 이 항목은 관리자 계정으로만 확인할 수 있습니다.

**My Account** **My Organization** My Scanner My Price List

☒ Address Information ☒ Organization Information ☐ Additional Information

**Address Information (Mandatory) \***

Address 1 \*  
23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea [View Location on Map](#)

1. Street Address, P.O. Box, Company Name, C/O  
2. Please enter the correct address so labs can check your company's location on the map.

Address 2  
Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.  
1. Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc.

Zip/Postal Code \*  
02835

City \*  
Seoul

Country \*  
Korea, Republic of ▾

State/Province \*  
Seoul

1. If you have a contract history, you cannot change the country information. Please contact Medit Link's operation team.

Office Phone \*  
+ 82 01026088546

Mobile Phone (Optional)  
+ 82 01026088546

## 내 스캐너

계정에 연결되었던 장비의 정보를 확인할 수 있습니다.

| My Account My Organization My Scanner My Price List |        |               |              |                |                  |                     |                       |                     |  |
|-----------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|
| No.                                                 | Type   | Serial Number | Usage Time ⓘ | Last Connected | Last Calibrated  | Warranty Start Date | Warranty Expiry Da... | Days Left ⓘ         |  |
| 1                                                   | i500   | AA1909103895  | 1d 3h 4m     | -              | 2020-07-06 09:48 | 2019-09-30          | 2021-03-30            | Purchase -738 Days  |  |
| 2                                                   | Hybrid | 1H16091L9003  | 3d 22h 31m   | -              | 2020-06-24 12:08 | 2016-09-27          | 2018-09-26            | Purchase -1654 Days |  |

## 내 가격 리스트 (가공소, 관리자 계정)

가공소에서 취급하는 상품 및 각 상품의 가격 정보를 입력할 수 있습니다.

My Account My Organization My Scanner My Price List ⓘ

Teeth Arch
AED (₩)

All (99/557) Inlay (8/12) Onlay (8/12) Coping (10/17) Denture Coping (5/5) Crown (15/26) Pontic (23/36) Post & Core (3/4) Veneer (8/11) Implant Crown (12/53) Custom Abutment (2/3) Surgical Guide (1/1) Offset Substructure (4/5) Partial Denture (8/7) Diagnostic Wax-Up (8/1) Custom Abutment + Implant Crown (0/159) Custom Abutment + Coping (0/45) Post & Core + Crown (0/100) Post & Core + Coping (0/60)

|                                     | Name          | Type  | Method | Material        | Price  |
|-------------------------------------|---------------|-------|--------|-----------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 인레이 지르코니아     | Inlay | -      | Zirconia        | \$6.03 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 인레이 골드        | Inlay | -      | Gold            | 1.03   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 인레이 프레스 세라믹   | Inlay | -      | Press Ceramic   | 2.03   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 인레이 레진        | Inlay | -      | Resin           | 3.03   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 인레이 하이브리드 세라믹 | Inlay | -      | Hybrid Ceramic  | 4.03   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 인레이 글라스 세라믹   | Inlay | -      | Glass Ceramic   | 1.00   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 인레이 컴퍼지트 레진   | Inlay | -      | Composite Resin | 1.00   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 인레이 e.max     | Inlay | -      | e.max           | 1.00   |

Save

### 참고

- 거래처와 계약 체결 시 설정한 상품 및 가격 정보를 기반으로 거래할 수 있습니다.
- 파트너쉽만 맺은 경우에는 가격을 기반으로 하는 거래는 지원하지 않습니다.

## 기타 메뉴

### 공지사항 및 업데이트

프로그램 업데이트 및 중요 알람을 표시합니다.

### Notice & Update

Notice  
NFT Service Termina...  
2023-04-19

Notice  
End of Support Notic...  
2023-04-14

Update  
Release Note for Me...  
2023-03-29

Notice  
[Medit] We've updat...  
2023-03-29

Update  
Release Note for Me...  
2023-03-17

Update  
Medit Occlusion Ana...  
2023-03-08

Notice  
NFT Service Termination Notice  
2023-04-19

To our users,  
  
We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.  
  
Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.  
  
Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
  - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
  - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

### Medit 정보

Medit Link 사용에 관한 다양한 정보를 얻을 수 있습니다. **Medit Academy YouTube**, **Medit 헬프 센터** 등으로 연결하여 **Medit** 사요에 대한 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

Need more help?

Medit Academy >

YouTube >

Help Center >


### 프로그램 다운로드

최신 버전의 프로그램 인스톨러를 다운로드합니다. 제품 구매 시 제공한 인스톨러를 분실하거나 구버전의 인스톨러를 보유한 경우, 최신 버전의 제품을 다운로드 받을 수 있습니다.


51

#### 참고

프로그램 업데이트는 인터넷이 연결되면 자동으로 이루어집니다.

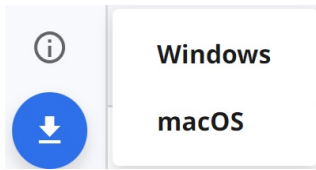

## 화면 구성

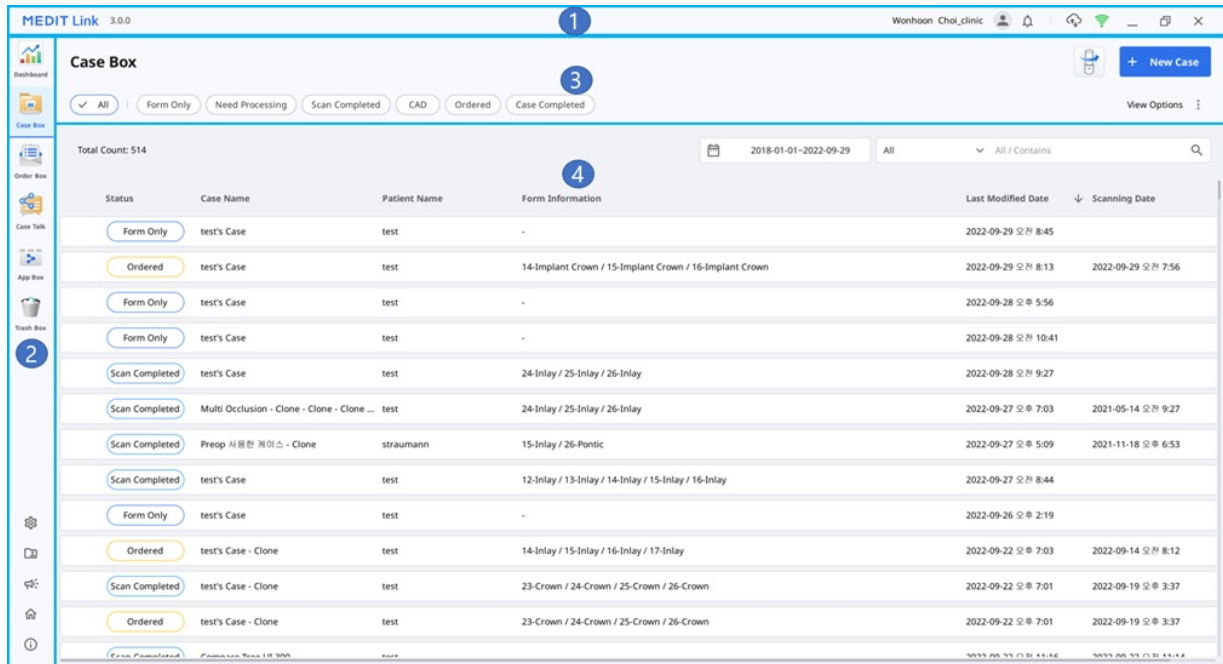

|   |         |                                                                                                          |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 타이틀바    | 자세한 정보는 <a href="#">Medit Link App &gt; 타이틀 바</a> 를 참고하세요.                                               |
| 2 | 메뉴      | 자세한 정보는 <a href="#">Medit Link App &gt; 메뉴</a> 를 참고하세요.                                                  |
| 3 | 도구 및 기능 | 자세한 정보는 <a href="#">Medit Link App &gt; 파일 뷰어</a> 그리고 <a href="#">Medit Link App &gt; 보기 옵션</a> 을 참고하세요. |
| 4 | 케이스 리스트 | 자세한 정보는 <a href="#">Medit Link App &gt; 필터링 및 검색</a> 을 참고하세요.                                            |

## 오버뷰

| 작업 순서  |                    | 클리닉 계정                                                                                                                                                     | 랩 계정                                                                                                               |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Step 1 | 케이스 생성             | <b>Case Box:</b> 케이스를 생성하고 생성한 케이스를 편리하게 찾고 확인하기 위해 다양한 필터링 및 검색 기능을 제공합니다. 생성한 케이스를 이용해 연동된 스캔 프로그램 및 <b>CAD</b> 프로그램을 이용해 스캔/ <b>CAD</b> 작업을 진행할 수 있습니다. |                                                                                                                    |
| Step 2 | 케이스 주문 및 관리        | <b>Order Box:</b> 주문한 케이스를 관리합니다. 주문 및 거래 완료까지의 프로세스를 관리하는 기능을 제공합니다.                                                                                      | <b>In Box:</b> 주문 받은 케이스를 관리합니다. 주문 수락, 거절, 배송, 거래 완료까지의 프로세스를 관리하기 위한 기능을 제공합니다.                                  |
| Step 3 | 스캔 및 <b>CAD</b> 작업 |                                                                                                                                                            | <b>Work Box</b> In Box에서 전달 받은 케이스 또는 직접 생성한 케이스를 관리합니다. 연동된 스캔 프로그램 및 캐드 프로그램을 이용해 스캔/ <b>CAD</b> 작업을 진행할 수 있습니다. |
| Step 4 | 케이스 공유             | <b>Case Talk:</b> Medit Link에서 생성한 케이스를 불특정 다수, 특정 인원, 또는 Medit Link 구성원에게 공유할 수 있습니다.                                                                     |                                                                                                                    |


|               |             |                                                                                                  |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Step 5</b> | 보완 또는 추가 작업 | <b>App Box:</b> 디지털 워크플로우를 보완하는 다양한 앱을 활용하세요.<br><b>Medit</b> 또는 타사가 제공하는 앱을 다운로드하거나 설치할 수 있습니다. |
| <b>Step 6</b> | 케이스 삭제 및 복원 | <b>Trash Box:</b> 삭제한 케이스를 확인하고 복원하거나 또는 완전히 삭제할 수 있습니다.                                         |

아래 표에서 클리닉 및 랩 계정의 유형 및 권한에 따라 사용할 수 있는 **Box**를 확인할 수 있습니다.

| 계정 유형  |     | Case Box | Order Box | In Box | Work Box | Case Talk | Trash Box     | App Box |
|--------|-----|----------|-----------|--------|----------|-----------|---------------|---------|
| 클리닉 계정 | 관리자 | O        | O         | X      | X        | O         | O             | O       |
|        | 회원  | O        | X         | X      | X        | O         | O<br>* 복구만 가능 | O       |
| 랩 계정   | 관리자 | X        | X         | O      | O        | O         | O             | O       |
|        | 회원  | X        | X         | X      | O        | O         | O<br>* 복구만 가능 | O       |

## 타이틀바

타이틀 바는 네트워크 상태, 클라우드 동기화, 회원 정보, 알림 등의 기능을 제공합니다.

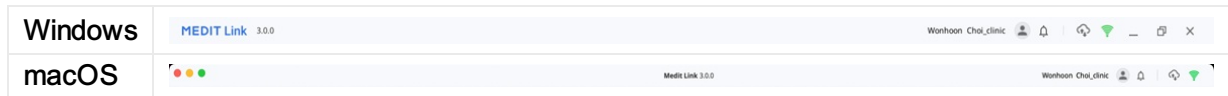

## 내 정보

프로필 이미지, 조직 이름, 이메일 주소, 사용자 이름 등 기본적인 회원 정보를 표시합니다

로그아웃하거나 **Medit Link** 웹 페이지로 이동하여 내 정보를 수정할 수 있습니다.

- |   |                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 프로필 이미지를 표시합니다.                                                                      |
| 2 | 조직 이름, 이메일 주소, 회원 이름을 표시합니다.                                                         |
| 3 | 현재 접속된 계정에서 로그아웃 합니다.                                                                |
| 4 | 현재 접속된 계정으로 <b>Medit Link</b> 웹 페이지로 이동합니다. 회원 가입 시 등록했던 사용자 정보를 확인, 수정, 관리할 수 있습니다. |

## 알림

계약/주문 및 작업 프로세스 관련 알림을 제공합니다.

**Notification**

1

☐ Display Unread Messages Only

Mark All As Read

2

**Delivery**  
Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has dispatched the ordered package.

2020-08-20 오후 5:20

**Order**  
Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has accepted the order.

2020-08-20 오후 5:18

**Order**  
Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

**Order**  
Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

**Order**  
Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

**Order**  
Wonhoonchoi\_Lab\_Dev has accepted the order.

2020-08-17 오후 4:05

**Work**  
Wonhoonchoi\_Clinice\_Dev\_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오후 6:33

**Work**  
Wonhoonchoi\_Clinice\_Dev\_Member registered a new case test's Case.

2020-08-14 오전 10:15

Close

- 1 읽지 않은 알림만 보려면 이 박스를 클릭하세요.
- 2 알림을 선택하면 해당 케이스 또는 웹 페이지로 바로 이동할 수 있습니다.

## 케이스 동기화 매니저

케이스 동기화 매니저를 이용해 **Medit Link**에서 케이스를 업로드 및 다운로드 할 수 있습니다. 여러 케이스를 클라우드에 업로드하거나 **PC**에 다운로드할 수 있습니다.

### Case Synchronization Manager

Upload
**Download**

Total Count: 240

Cancel All
**Download All**

| Case Name                                                                                          | Date Modified ↓ | Size      | Status        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| <input type="checkbox"/> test's Case                                                               | 2021-09-07      | 318.58 MB | Need Download |
| <input type="checkbox"/> test scan                                                                 | 2021-09-02      | 626.09 MB | Need Download |
| <input type="checkbox"/> test's Case                                                               | 2021-09-02      | 6.61 kB   | Need Download |
| <input type="checkbox"/> test's Case                                                               | 2021-08-26      | 127.31 kB | Need Download |
| <input type="checkbox"/> test's Case                                                               | 2021-08-24      | 172.75 MB | Need Download |
| <input type="checkbox"/> test's Case                                                               | 2021-08-23      | 516.34 kB | Need Download |
| <input type="checkbox"/> test's Case                                                               | 2021-08-19      | 74.13 MB  | Need Download |
| <input type="checkbox"/> test's Case11111111111111111111111213123123131312333111111111111144444444 | 2021-08-19      | 133.15 MB | Need Download |
| <input type="checkbox"/> 2.3.6 Case - Clone - Clone - Clone - 복제 - 복제 - Clone                      | 2021-08-19      | 234.72 MB | Need Download |
| <input type="checkbox"/> test's Case                                                               | 2021-08-19      | 496.65 kB | Need Download |
| <input type="checkbox"/> test's Case                                                               | 2021-08-13      | 248.79 kB | Need Download |
| <input type="checkbox"/> test's Case                                                               | 2021-08-13      | 149.20 MB | Need Download |

Close

## 업로드

|                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 케이스 수 / 선택                                                                          | 업로드가 필요한 전체/선택한 케이스의 수를 표시합니다. |
| 전체 업로드                                                                              | 모든 케이스를 클라우드에 업로드 합니다.         |
| 전체 취소                                                                               | 모든 업로드 요청을 취소합니다.              |
|  | 케이스를 클라우드에 업로드 합니다.            |
|  | 업로드를 취소합니다.                    |
|  | 업로드를 재시도합니다.                   |

다운로드

|                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 케이스 수 / 선택                                                                          | 다운로드가 필요한 전체/선택한 케이스의 수를 표시합니다.  |
| 전체 다운로드                                                                             | 모든 케이스를 로컬 <b>PC</b> 에 다운로드 합니다. |
| 전체 취소                                                                               | 모든 다운로드 요청을 취소합니다.               |
|  | 케이스를 로컬 <b>PC</b> 에 다운로드 합니다.    |

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 다운로드를 취소합니다.  |
|  | 다운로드를 재시도합니다. |

## 네트워크 상태

**Medit Link**는 네트워크와 연결되어 있을 때 서비스의 모든 기능을 원활하게 사용할 수 있습니다.

네트워크 연결 상태를 실시간으로 확인할 수 있도록 타이틀 바에 네트워크 상태가 아이콘으로 표시됩니다.

네트워크 상태가 양호하지 않으면 다음과 같은 제약이 발생합니다.

- 주문, **Case Talk**, 클라우드 동기화 등 일부 서비스의 사용이 제한됩니다.
- 네트워크 환경의 영향으로 서비스의 성능이 전체적으로 떨어질 수 있습니다.

이러한 경우 오프라인 모드를 이용해 기본적인 작업을 먼저 진행하고, 네트워크 사용이 필요한 기능은 네트워크 연결 후 사용할 수 있습니다.

### 참고

네트워크 안테나는 해당 지역과 **AWS(Amazon Web Service)** 사이의 응답 속도를 나타냅니다. 이는 네트워크 속도를 의미하는 것이 아니며, 네트워크 속도가 충분히 빠르더라도 네트워크 상태는 “**좋지 않음**”으로 표시될 수 있습니다.


네트워크 자원을 다른 프로세스에서 사용하고 있는 경우에도 안테나가 “**좋지 않음**”으로 표시될 수 있고 **Medit Link** 성능이 전반적으로 떨어질 수 있습니다. 이런 경우 다른 프로세스와 네트워크 자원을 공유하지 마세요.

특히 원본 데이터 업로드 기능은 네트워크 자원이 많이 필요한 프로세스입니다. 네트워크 안테나가 좋지 않음으로 표시되는 경우, 설정 > 스캔 원본파일 업로드 옵션을 끄면 **Medit Link**의 응답 속도가 더욱 빨라질 수 있습니다.

## 메뉴

### Dashborad


Medit Link에서 진행한 전체 작업에 대한 통계를 그래프와 차트를 통해 확인할 수 있습니다.

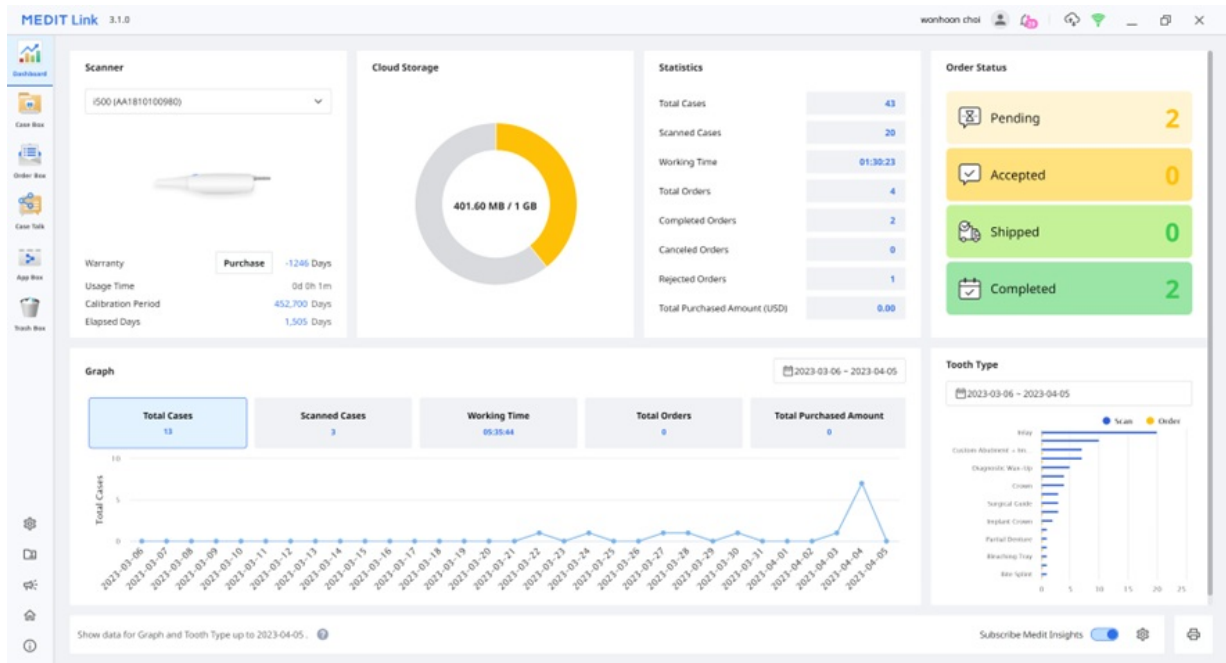

#### 참고

Dashboard와 Medit Insights에 대한 자세한 정보는 [Medit Link 웹 > Dashboard](#)를 참고하세요.

## Case Box/Work Box

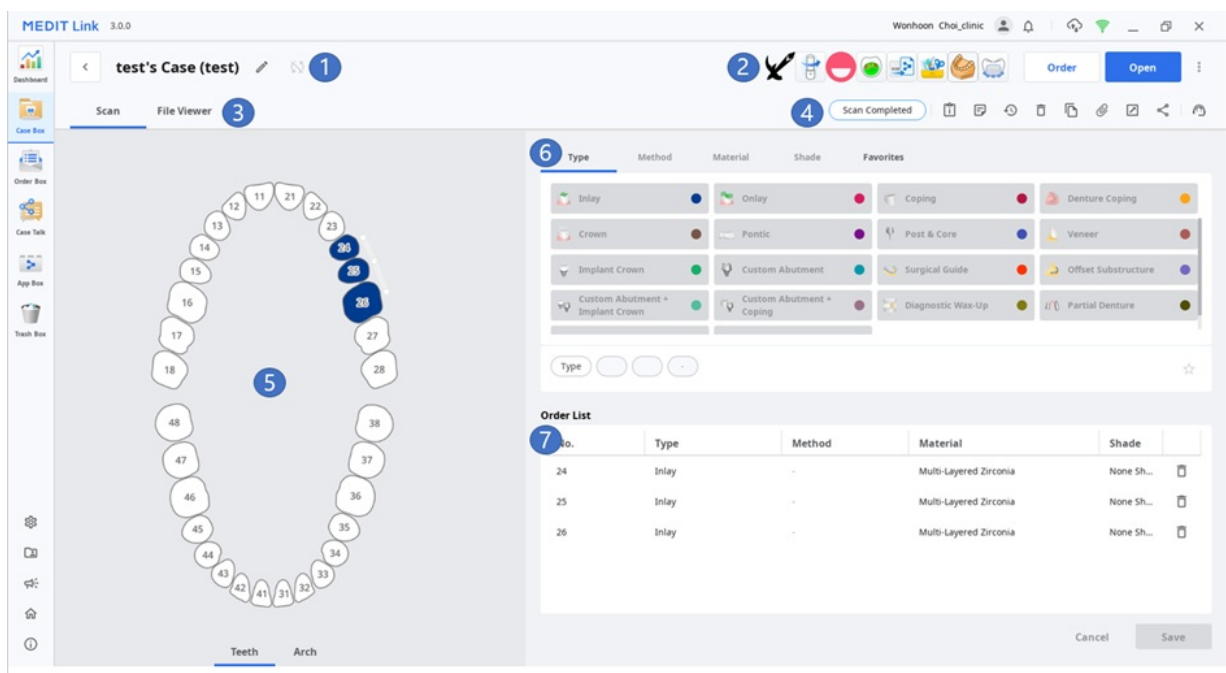

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | 케이스 이름과 환자 이름을 표시합니다.                      |
| 2 | 스캔, CAD, 주문, 앱 등의 주요 기능을 표시합니다.            |
| 3 | 품, CAD, 및 파일 뷰어 중 사용할 수 있는 탭을 보여줍니다.       |
| 4 | 케이스와 파일을 관리하기 위한 기능을 제공합니다.                |
| 5 | 선택한 스캔 또는 CAD 프로그램에서 사용할 수 있는 품 정보를 제공합니다. |
| 6 | 치아에 적용할 수 있는 유형/방식/재료/셰이드를 표시합니다.          |
| 7 | 선택한 치아 번호 및 유형/방식/재료/셰이드의 조합을 표시합니다.       |

## Case Box/Work Box에서 제공하는 탭

| 품                                                                                                                         | CAD                                                                                        | 파일 뷰어                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 치아 번호의 유형, 방법, 재료와 스캔 옵션과 같은 스캔 작업을 위한 기본 정보를 입력할 수 있는 UI가 제공됩니다. 입력한 정보는 연동된 스캔 프로그램에 전달되고, 주문 시 거래처에 전달되는 주문 정보로 사용됩니다. | CAD 작업을 진행하기 위한 CAD 옵션을 입력하는 UI를 제공합니다.<br><br>설정된 정보는 연결된 CAD 프로그램으로 전달되어 작업을 진행할 수 있습니다. | 스캔/CAD 작업을 통해 생성된 결과 파일을 확인하기 위한 UI를 제공합니다.<br><br>각 프로그램에서 진행하거나 사용자가 첨부한 3D 데이터와 이미지를 효과적으로 표시하고 관리할 수 있는 기능을 제공합니다. |


## Case Box/Work Box에서 사용할 수 있는 기능

Case Box/Work Box에서는 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

|                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 케이스 상태  | 케이스의 상태를 표시합니다.                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 상세정보 보기 | 케이스의 상세 정보를 보기 위해 <b>Box</b> 를 이동합니다. ( <b>Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box</b> ).                                                                                                                                                       |
|  | 케이스 정보  | 케이스 정보를 확인하고 <b>PDF</b> 로 저장하거나 프린트합니다.                                                                                                                                                                                                         |
|  | 메모 & 태그 | 케이스 등록/주문 시 입력한 메모/태그를 표시합니다. 주문 과정에서 메모는 포함되며 케이스에 관한 더 자세한 정보를 공유할 수 있습니다.                                                                                                                                                                    |
|  | 케이스 이력  | 케이스의 상세 정보를 제공합니다. <div><div>History</div><div><div>Last Modified Date3/29/2022 1:57 PM</div><div>Scanning Date4/12/2021 2:06 PM</div><div>Creation Date3/22/2022 1:17 PM</div></div><div><div>Case Size435MB</div></div><div>Close</div></div> |
|  | 삭제      | 케이스를 삭제합니다.<br>주문 중인 케이스나 오프라인에서 생성된 케이스는 삭제할 수 없습니다.                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 복제      | 케이스를 복제하여 동일한 케이스를 생성합니다. 모든 데이터가 복제된 케이스로 복사됩니다.<br>동일한 환자의 치료 정보를 복제하여 또 다른 스캔을 진행하거나, 동일한 케이스의 모든 정보/파일을 복제하여 추가로 주문을 진행할 수 있습니다.                                                                                                      |
|  | 첨부      | 다양한 형식의 파일을 첨부할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 내보내기    | 스캔 또는 <b>CAD</b> 작업 후 결과 파일을 로컬 <b>PC</b> 로 내보내기합니다. 원하는 파일 포맷을 선택하여 내보내기할 수 있습니다.<br>내보낸 파일은 <b>CAD</b> 나 <b>CAM</b> 등 이후 프로세스에 활용할 수 있습니다.                                                                                              |
|  | 공유      | 케이스를 공유할 수 있는 링크를 생성합니다.<br><br>공유된 링크에 접속한 사용자는 별도의 프로그램 설치 없이 <b>Chrome, Firefox, Safari</b> 와 같은 인터넷 브라우저를 이용해 간단하게 <b>3D</b> 데이터를 확인할 수 있습니다.<br><br>생성된 링크는 공개 범위를 설정할 수 있습니다. 개인 정보를 보호하기 위해 <b>PIN</b> 코드나 링크 기한 만료일을 설정할 수도 있습니다. |
|  | 기술지원 요청 | <b>Medit</b> 헬프 센터 페이지로 이동하여 기술 지원을 요청할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                           |

## Order Box/In Box

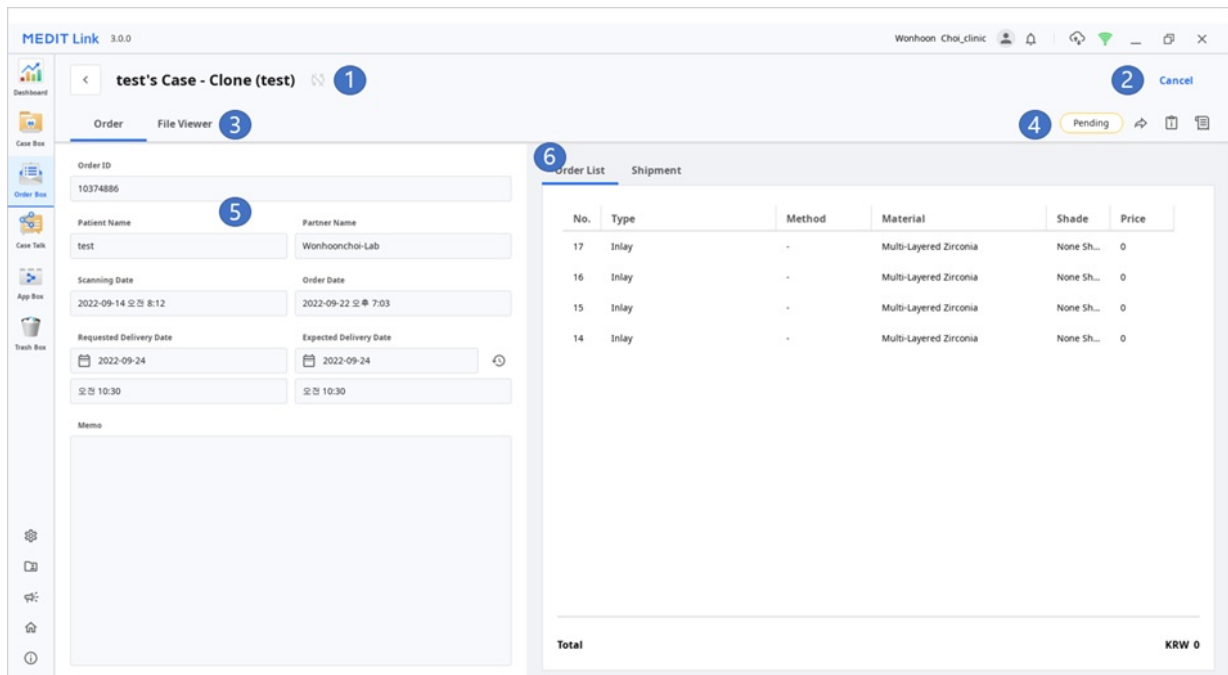

|   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 케이스 이름과 환자 이름을 표시합니다.                                              |
| 2 | 주문 수락/취소, 기공물 배송/수령 등 주문 관리를 위한 기능을 제공합니다.                         |
| 3 | 주문 및 파일 뷰어 중 사용할 수 있는 탭을 보여줍니다.                                    |
| 4 | 케이스와 파일을 관리하기 위한 기능을 제공합니다.                                        |
| 5 | 주문 ID, 환자 이름, 거래처 이름, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 배송 날짜, 메모 등 주문 상세 정보를 표시합니다. |
| 6 | 주문한 상품 정보, 배송 정보를 표시합니다.                                           |

### Order Box?In Box에서 제공하는 탭

| 주문                                                                                             | 파일 뷰어                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주문 ID, 환자 이름, 거래처 이름, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 배송 날짜, 메모, 태그 및 주문한 상품에 대한 정보 등 주문 관련 상세 정보를 확인할 수 있습니다. | 스캔이나 <b>CAD</b> 등을 통해 생성된 결과 파일을 확인할 수 있습니다.<br>사용자가 첨부하거나 각 프로그램으로부터 획득한 <b>3D</b> 데이터나 이미지를 표시하고 관리할 수 있는 기능을 제공합니다. |

## Case Talk

**Medit Link** 어플리케이션에서 생성한 케이스를 불특정 다수, 특정 인원, **Medit Link** 구성원에게 공유할 수 있습니다.

**Case Talk**을 통해 Medit Link의 웹과 앱에서 공유된 케이스의 리스트를 확인할 수 있습니다.

## i 참고

**Case Talk** 기능을 사용하려면 인터넷이 연결되어 있어야 합니다.

MEDIT Link 3.0.0
Wonhoon Choi\_clinic

## Case Talk

2018-01-01 ~ 2022-09-29

▼

| Case Talk Name                                                                                                           | Patient Name | Form Information  | Scanning Date    | Shared Date ↓    | Expiration Date  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| test's Case_262 - Clone_2022-08-05 18:00:05                                                                              | test         | 14, 15, 16, 17    | 2022-07-28 08:27 | 2022-08-05 18:00 | 2022-11-03 23:59 |
| Wonhoonchoi_real - Clone_2022-07-25 18:09:10                                                                             | test1        | Maxilla, Mandible | -                | 2022-07-25 18:09 | 2022-10-23 23:59 |
| Wonhoonchoi_real - Clone_2022-07-25 18:02:36                                                                             | test1        | Maxilla, Mandible | -                | 2022-07-25 18:02 | 2022-10-23 23:59 |
| Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Cl_2022-07-21 11:58:18 | test         | 24, 25, 26        | 2021-05-14 09:27 | 2022-07-21 11:58 | 2022-10-19 23:59 |
| Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Cl_2022-07-21 11:57:54 | test         | 24, 25, 26        | 2021-05-14 09:27 | 2022-07-21 11:57 | 2022-10-19 23:59 |
| Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Clone - Cl_2022-07-21 11:56:47 | test         | 24, 25, 26        | 2021-05-14 09:27 | 2022-07-21 11:56 | 2022-10-19 23:59 |
| test1's Case_2022-07-14 14:45:16                                                                                         | test1        | Maxilla           | 2022-07-06 10:36 | 2022-07-14 14:45 | 2022-10-12 23:59 |


공유한 케이스는 별도의 프로그램 설치 없이 인터넷 브라우저에서 확인 가능하기 때문에 인터넷 사용이 가능한 **PC**, 노트북, 스마트폰, 태블릿 등의 기기에서 쉽게 **3D** 스캔 데이터를 확인하고 커뮤니케이션할 수 있습니다.

## App Box

**App Box**는 기본 스캔 워크플로우를 보완하고 생산성을 향상시키는 다양한 애플리케이션을 제공합니다.

**Medit Apps**에는 **Medit**에서 개발한 앱과 더불어 **3D 프린팅**, 기타 **CAD/CAM** 소프트웨어 등 디지털 의학 분야의 다양한 파트너들이 개발한 앱이 제공됩니다.

**Medit Apps**와 **Partner Apps**의 다양한 앱을 활용하여 치료 기기를 만들고, 스캔 데이터를 분석하고, 상담 중 도움을 받거나, 업무 프로세스를 간소화하세요.

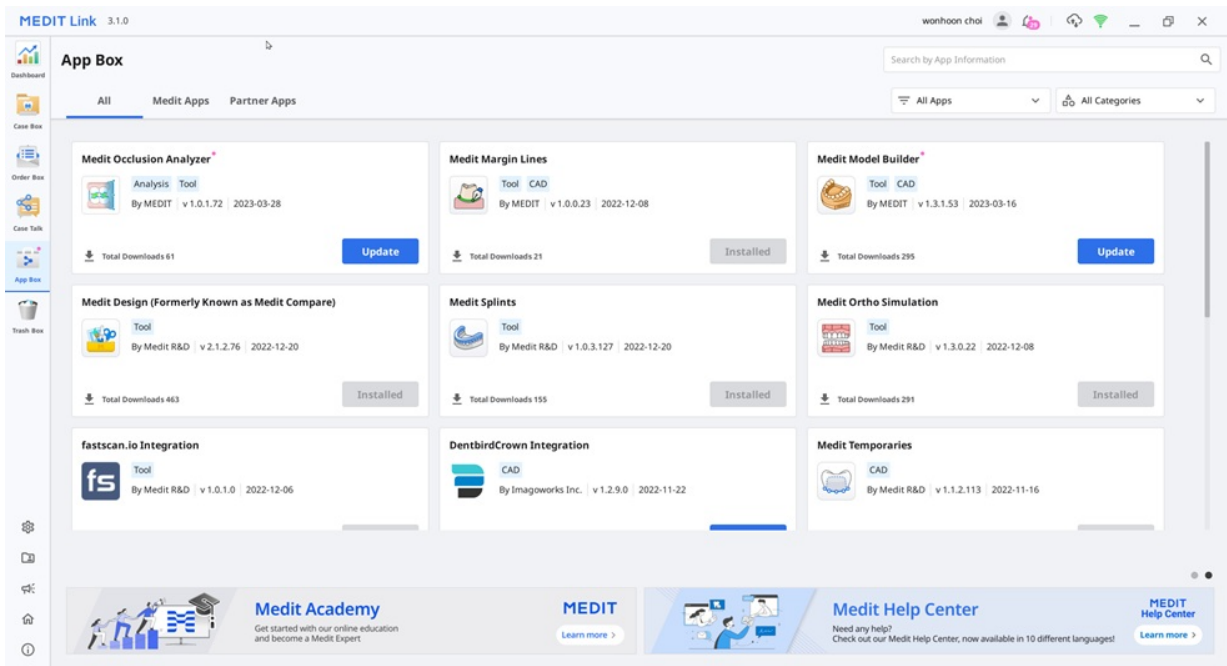


## Trash Box

**Trash Box**는 삭제한 케이스를 완전히 삭제하기 전 보관하기 위한 공간입니다. **Trash Box**에 있는 모든 케이스는 복원하거나 영구 삭제할 수 있습니다.

### ⚠ 주의

**Trash Box**에서 삭제한 데이터는 **PC** 및 서버로부터 삭제되어 복구할 수 없습니다.

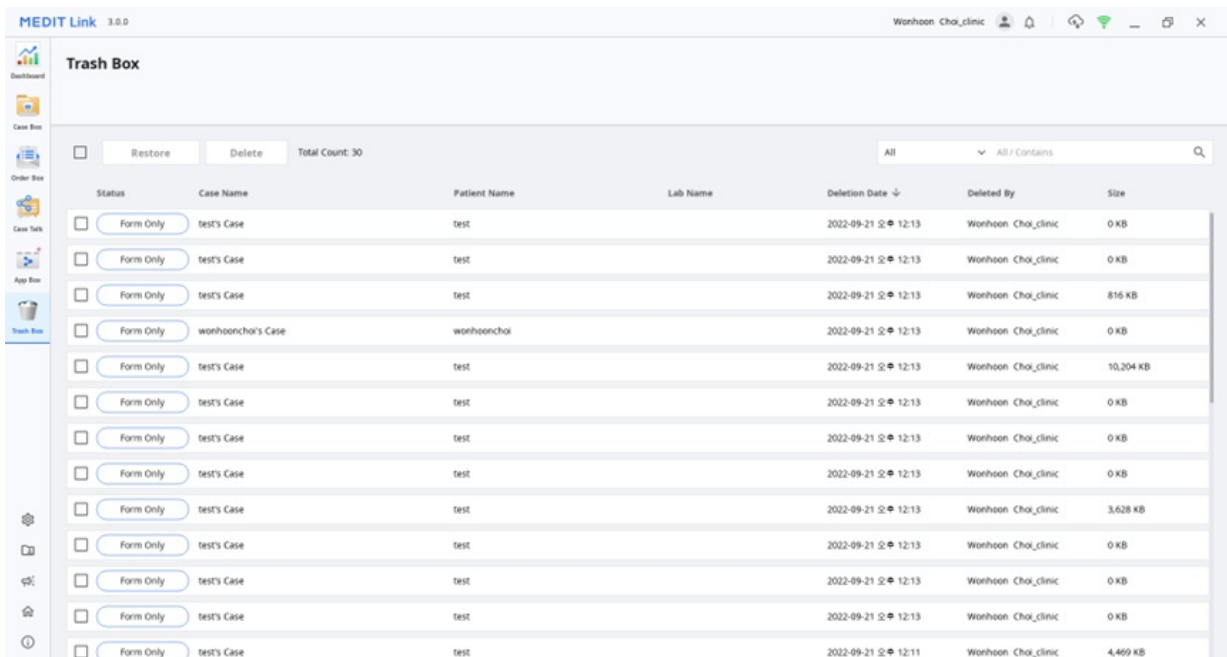

## 설정

설정 창에 대한 자세한 내용은 [Medit Link 앱 > 설정](#)을 참조하세요.

## 환자 관리

환자 관리 창에서 환자를 추가, 편집, 삭제 또는 병합할 수 있습니다.

**Patient Management**

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.  
Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.  
Press 'Delete' to remove patients from the system.

AB Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

|                                     | Patient Name             | Patient ID | Gender | Birth Date | Number of Cases | Date Registered | Recent Visit Date |  |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3-9_Scan_CAMOrder_Teeth2 |            |        |            | 3               | 2020-09-18      | 2020-09-18        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3-9_Scan_CAMOrder_Teeth2 |            |        |            | 1               | 2020-09-18      | 2020-09-18        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | test                     |            |        |            | 2               | 2020-09-17      | 2020-09-17        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | test                     |            |        |            | 22              | 2019-07-26      | 2020-09-17        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | test                     |            |        |            | 1               | 2020-09-17      | 2020-09-17        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ASD Demo                 |            |        |            | 1               | 2020-09-16      | 2020-09-16        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ASD Demo                 |            |        |            | 1               | 2020-09-16      | 2020-09-16        |  |
| <input type="checkbox"/>            | gmm                      |            |        |            | 1               | 2020-09-15      | 2020-09-15        |  |
| <input type="checkbox"/>            | Medit Link 2.3.0         |            |        | 2020-9-24  | 2               | 2020-09-14      | 2020-09-14        |  |
| <input type="checkbox"/>            | test                     |            |        |            | 1               | 2020-09-13      | 2020-09-13        |  |
| <input type="checkbox"/>            | 복사대상                     |            |        |            | 2               | 2020-09-13      | 2020-09-13        |  |
| <input type="checkbox"/>            | test3                    |            |        |            | 1               | 2020-09-13      | 2020-09-13        |  |
| <input type="checkbox"/>            | test1                    |            |        |            | 1               | 2020-09-13      | 2020-09-13        |  |
| <input type="checkbox"/>            | testq1231                |            |        |            | 26              | 2019-07-25      | 2020-09-11        |  |

Close

## 새 환자 추가

1. "새 환자"를 클릭하세요.

**New Patient**

Patient Name\*

Add new patient

General

☐ Female ☐ Male

Birth Date

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Creating patient information involves consent from the patient.  
Patient information can be shared with 3-parties on order.  
[Terms & Conditions](#)

Cancel Save

2. 새 환자 창에서 필요한 정보를 입력한 다음 "저장"을 클릭합니다.

## 환자 삭제

### 참고

환자에 대한 케이스가 없는 경우에만 환자를 삭제할 수 있습니다.

1. 목록에서 삭제할 환자를 선택합니다.

**Patient Management**

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.  
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.  
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

|                                     | Patient Name         | Patient ID | Gender | Birth Date | Number of Cases | Date Registered | Recent Visit Date |  |  |
|-------------------------------------|----------------------|------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/>            | test                 |            |        |            | 0               | 2019-08-28      | 2019-09-02        |  |  |
| <input type="checkbox"/>            | test                 |            |        |            | 0               | 2019-08-28      | 2019-08-28        |  |  |
| <input type="checkbox"/>            | test                 |            |        |            | 0               | 2019-08-28      | 2019-08-28        |  |  |
| <input type="checkbox"/>            | A.I.Abument2         |            |        |            | 0               | 2019-08-28      | 2019-08-28        |  |  |
| <input type="checkbox"/>            | Scarbody             |            |        |            | 0               | 2019-08-28      | 2019-08-28        |  |  |
| <input type="checkbox"/>            | Margin Line Creation |            |        |            | 0               | 2019-08-28      | 2019-08-22        |  |  |
| <input type="checkbox"/>            | Abument Library      |            |        |            | 0               | 2019-08-28      | 2019-08-22        |  |  |
| <input type="checkbox"/>            | GuideMessage         |            |        |            | 0               | 2019-08-28      | 2019-08-16        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | margin               |            |        |            | 0               | 2019-08-28      | 2019-08-07        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | test2                |            |        |            | 0               | 2019-08-28      | 2019-08-07        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | sulkyadolkf          |            |        |            | 0               | 2019-08-28      | 2019-08-07        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | test                 |            |        |            | 0               | 2019-08-28      | 2019-08-07        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | test                 |            |        |            | 0               | 2019-08-28      | 2019-07-26        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | test                 |            |        |            | 0               | 2019-08-28      | 2019-07-25        |  |  |

Close

2. "삭제"를 클릭합니다.

## 환자 병합

환자 정보 및 해당 환자에 속한 케이스를 하나의 환자 정보로 통합하여 관리할 수 있습니다.

1. 목록에서 병합할 환자를 선택합니다.

**Patient Management**

Allows to select patients to delete or merge their information from different cases.  
 Allows to merge together information of a single patient spread across multiple cases. After merging, all cases of the patient are combined together under the patient name you selected.  
 Press 'Delete' to remove patients from the system.

All Search / Contains + New Patient

Delete Merge Patients Patients with No Cases

|                                     | Patient Name             | Patient ID | Gender | Birth Date | Number of Cases | Date Registered | Recent Visit Date |  |  |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/>            | 5-9 /Scan_CAMOrder_test2 |            |        |            | 3               | 2020-09-18      | 2020-09-18        |  |  |
| <input type="checkbox"/>            | 5-9 /Scan_CAMOrder_test2 |            |        |            | 1               | 2020-09-18      | 2020-09-18        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | test                     |            |        |            | 2               | 2020-09-17      | 2020-09-17        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | test                     |            |        |            | 22              | 2019-07-25      | 2020-09-17        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | test                     |            |        |            | 1               | 2020-09-17      | 2020-09-17        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ASD Demo                 |            |        |            | 1               | 2020-09-16      | 2020-09-16        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ASD Demo                 |            |        |            | 1               | 2020-09-16      | 2020-09-16        |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | gmt                      |            |        |            | 1               | 2020-09-15      | 2020-09-15        |  |  |
| <input type="checkbox"/>            | Medit Link 2.3.3         |            |        | 2020-9-24  | 2               | 2020-09-14      | 2020-09-14        |  |  |
| <input type="checkbox"/>            | test                     |            |        |            | 1               | 2020-09-13      | 2020-09-13        |  |  |
| <input type="checkbox"/>            | 测试用例                     |            |        |            | 2               | 2020-09-13      | 2020-09-13        |  |  |
| <input type="checkbox"/>            | test2                    |            |        |            | 1               | 2020-09-13      | 2020-09-13        |  |  |
| <input type="checkbox"/>            | test1                    |            |        |            | 1               | 2020-09-13      | 2020-09-13        |  |  |
| <input type="checkbox"/>            | test21231                |            |        |            | 26              | 2019-07-25      | 2020-09-11        |  |  |

Close

2. "환자 병합"을 클릭합니다.

3. 병합의 기준이 될 환자를 선택합니다.

4. 선택한 환자 정보를 기준으로 모든 케이스가 병합됩니다.

**Merge all patient information to**

Please select the patient you'd like to merge all data to.  
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

|                                  | Patient Name        | Patient ID | Gender | Birth Date | Number of Cases | Date Registered | Recent Visit Date |
|----------------------------------|---------------------|------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 5-9_jScan_CAMOrd... |            |        |            | 1               | 2020-09-18      | 2020-09-18        |
| <input type="radio"/>            | test                |            |        |            | 2               | 2020-09-17      | 2020-09-17        |
| <input type="radio"/>            | test                |            |        |            | 22              | 2019-07-26      | 2020-09-17        |

Cancel Apply

5. "적용"을 클릭하여 병합을 진행합니다.

## 공지사항 & 업데이트

프로그램 업데이트 및 중요 알람을 표시합니다.

## Medit Link Web으로 이동

현재 **Medit Link**에 로그인 되어 있는 계정으로 **Medit Link Web** 서비스에 접속합니다.

## Medit 유용한 정보

**Medit Link** 사용에 관한 다양한 정보를 얻을 수 있습니다. **Medit Academy YouTube**, **Medit** 헬프 센터 등으로 연결하여 **Medit** 사요에 대한 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

Need more help? X

 **Medit Academy** >


 **YouTube** >

 **Help Center** >

## 설정

### 일반


시스템 전반의 일반 옵션을 설정합니다.

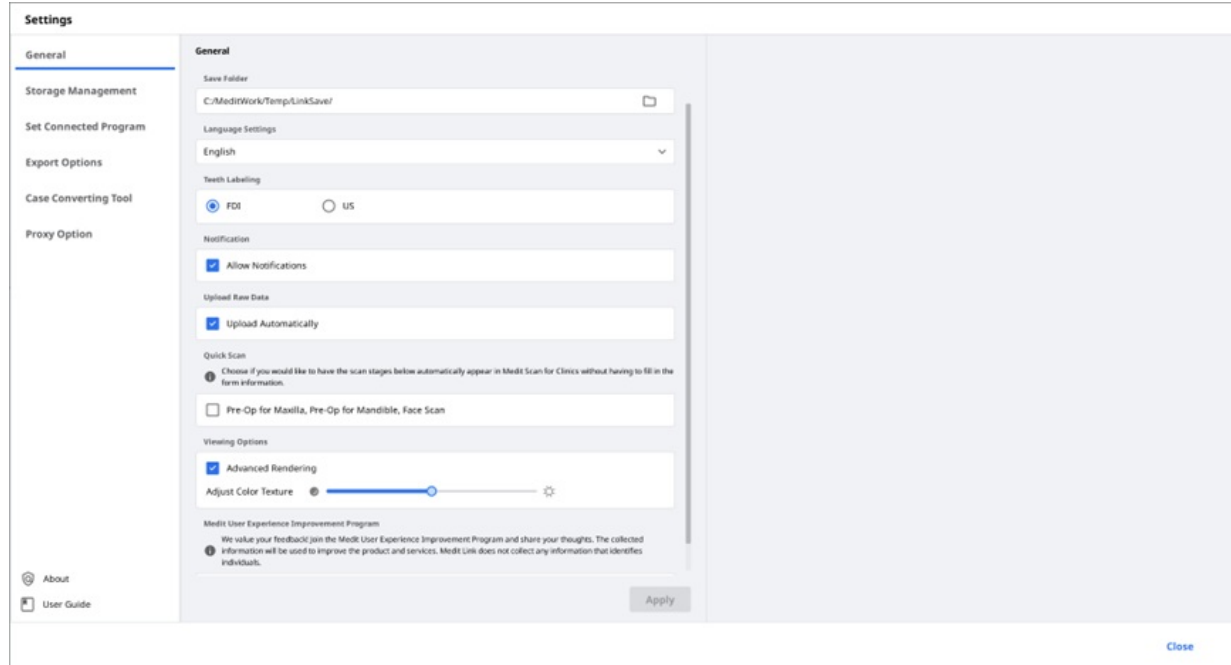

|                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 저장 폴더                       | <b>Medit Link</b> 및 연동된 프로그램들로부터 생성된 결과물을 저장할 폴더를 지정합니다.                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |
| 언어 설정                       | 사용할 언어를 선택합니다.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
| 라벨링                         | 치아 번호를 표시할 방법을 선택합니다. <b>FDI</b> 와 <b>US</b> 중 선택 가능합니다.                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |
| 알림                          | 프로그램 업데이트 관련 공지 사항에 대한 알림 수신 여부를 설정합니다.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| 원본 데이터 업로드                  | 원본 데이터를 자동으로 클라우드에 업로드 할지 여부를 결정합니다. 클라우드에 업로드 된 원본 데이터로 데이터 백업이 가능하며 다른 <b>PC</b> 에서 동일 계정으로 <b>Medit Link</b> 를 사용할 때 원활한 스캔 작업을 할 수 있습니다. <b>Medit Scan for Clinics</b> 에서 획득한 데이터만 클라우드에 백업할 수 있습니다. |                                                                                                                       |
| 빠른 스캔                       | <p>품 정보를 입력하지 않고 <b>Medit Scan for Clinics</b>를 실행한 경우 다음 스캔 단계가 표시됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 상악 진단 모델</li> <li>• 하악 진단 모델</li> <li>• 안면 스캔</li> </ul>                            |                                                                                                                       |
| 보기 옵션                       | 고급 렌더링                                                                                                                                                                                                   | <b>3D</b> 모델을 보다 사실감 있게 표현합니다.                                                                                        |
|                             | 색상 조정                                                                                                                                                                                                    | <p>화면에 보여지는 모델의 밝기를 설정합니다.</p> <p>내보내기한 데이터를 다른 프로그램에서 확인하는 경우, 렌더링 방식의 차이로 <b>Medit Link</b>의 결과와 다르게 보일 수 있습니다.</p> |
| <b>Medit</b> 사용자 경험 개선 프로그램 | <p><b>Medit</b> 사용자 경험 개선 프로그램에 참여합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수집한 정보는 제품 및 서비스의 품질 향상을 위해 사용합니다.</li> <li>• 개인 정보와 관련된 어떠한 정보도 수집하지 않습니다.</li> </ul>                               |                                                                                                                       |

## 저장소 관리

저장소 사용 현황을 확인하고 관리하기 위한 기능을 제공합니다.

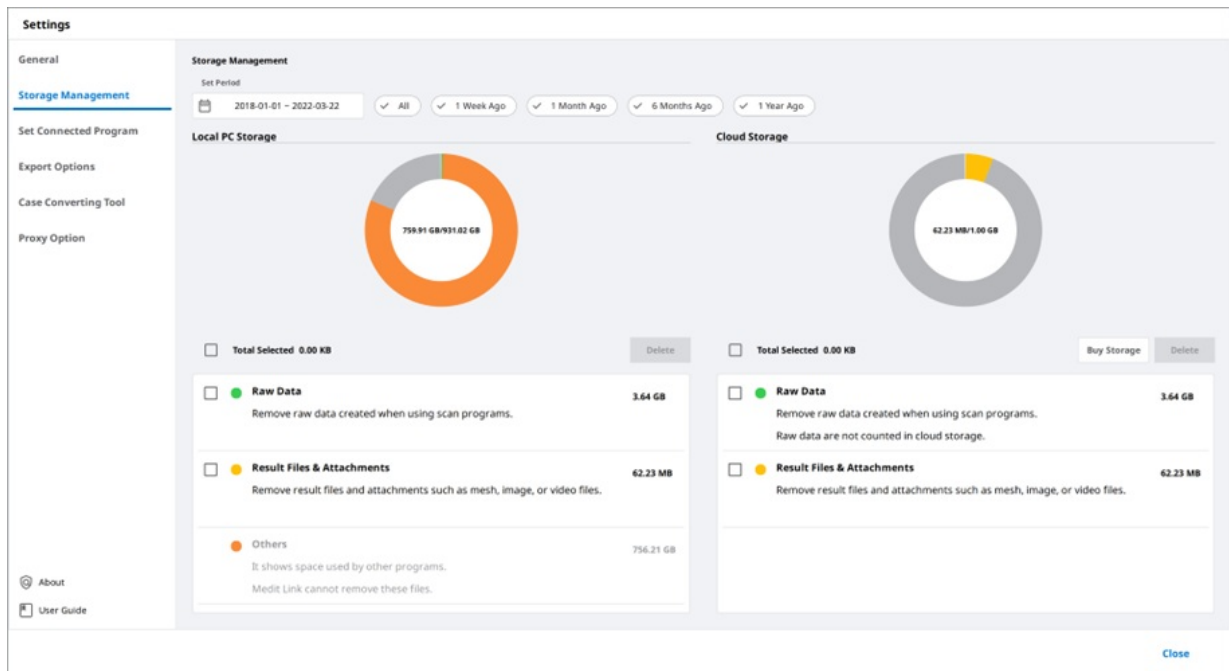

## 기간 설정

기간을 설정합니다. 설정한 기간 내의 데이터가 삭제 대상이 됩니다

- 전체: 모든 데이터를 표시합니다.
- 일주일 전: 생성 후 1주일이 경과한 데이터를 표시합니다.
- 1개월 전: 생성 후 1개월이 경과한 데이터를 표시합니다.
- 6개월 전: 생성 후 6개월이 경과한 데이터를 표시합니다.
- 1년 전: 생성 후 1년이 경과한 데이터를 표시합니다.

## 컴퓨터 저장 공간

로컬 PC의 스토리지 용량을 확인하고 관리하는 기능을 제공합니다.

|               |                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원본 데이터        | 로컬 PC로부터 원본 데이터를 삭제합니다.<br>이미 클라우드에 업로드 한 데이터는 언제든지 다운로드 하여 사용할 수 있습니다.                                                        |
| 결과 파일 및 첨부 파일 | 로컬 PC로부터 결과 및 첨부 데이터를 삭제합니다.<br>이미 클라우드에 업로드 한 데이터는 언제든지 다운로드 하여 사용할 수 있습니다.                                                   |
| 기타            | 윈도우 또는 <b>Medit Link</b> 이외의 프로그램에서 사용하는 용량을 표시합니다. 로컬 PC의 스토리지 용량을 확인하기 위한 용도입니다. <b>Medit Link</b> 에서 해당 데이터를 직접 삭제할 수 없습니다. |
| 삭제            | 선택한 데이터를 로컬 PC에서 삭제합니다.                                                                                                        |


## 클라우드 저장소

클라우드 스토리지의 용량을 확인하고 관리하는 기능을 제공합니다.

|               |                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원본 데이터        | 원본 데이터는 클라우드 스토리지 용량을 사용하지 않아, 그래프에 표시되지 않습니다. 개인 정보 보호 등의 이유로 클라우드 스토리지에서 원본 데이터를 관리하고 싶은 경우 사용할 수 있습니다. |
| 결과 파일 및 첨부 파일 | 결과 및 첨부 파일은 클라우드 스토리지의 용량을 사용합니다. 클라우드 스토리지 용량이 가득 찼을 경우, 사용하지 않는 데이터를 삭제하여 용량을 확보할 수 있습니다.               |
| 저장공간 구매       | 스탠다드 플랜을 사용하는 경우, 프리미엄 플랜으로 변경하여 저장 용량을 추가 구매할 수 있습니다.                                                    |
| 삭제            | 선택한 데이터를 클라우드로부터 삭제합니다.                                                                                   |

## 연결 프로그램 설정

Medit Link와 연동하여 사용할 프로그램을 관리합니다.

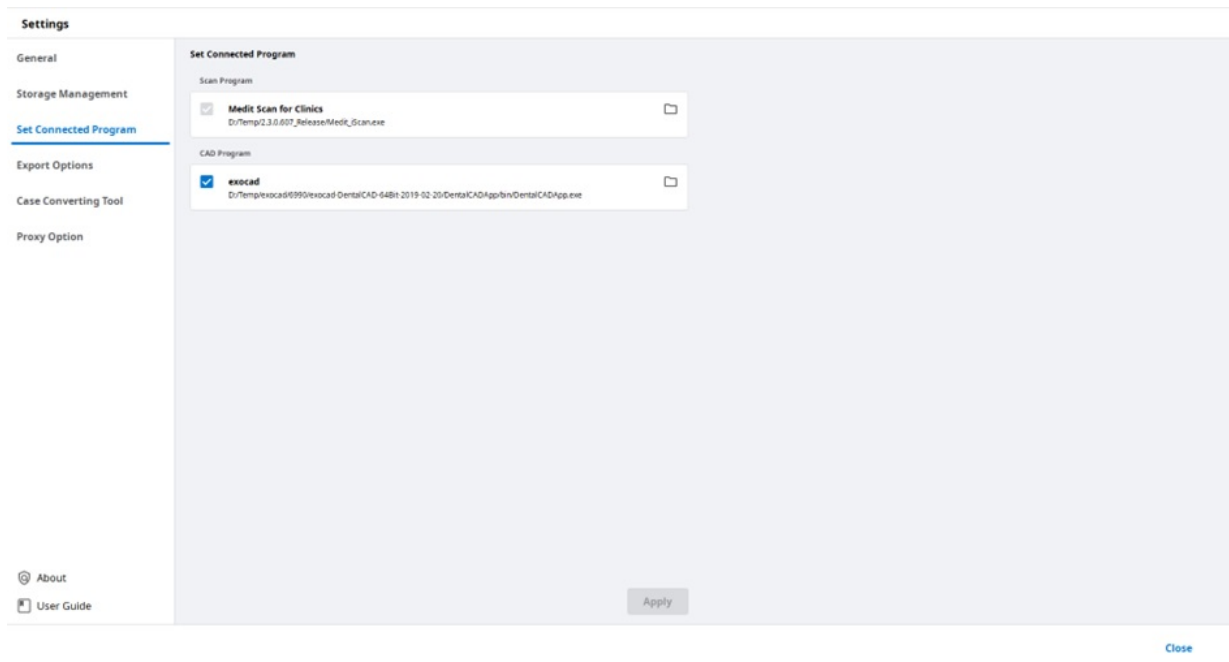

다음 프로그램과 연동이 가능합니다.

|          | 클리닉 계정                 | 랩 계정                                          |
|----------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 스캔 프로그램  | Medit Scan for Clinics | Medit Scan for Clinics<br>Medit Scan for Labs |
| CAD 프로그램 | exocad                 | exocad                                        |

### 참고

Medit Link macOS 버전에서는 다음 서비스를 지원하지 않습니다.

- Medit Scan for Labs
- exocad

## 내보내기 옵션


보내기 시 사용할 기본값을 설정합니다.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 캐드 종류                  | <p>디자인에 사용할 캐드 프로그램을 선택합니다.</p> <p>각 프로그램의 기준축 정보로 결과물을 생성하여 별도의 축 맞춤 작업 없이 바로 디자인을 진행할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 내보내기 경로                | <p>결과물을 저장할 경로를 지정합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 메시 형식                  | <p>결과물로 사용할 메시 파일의 형식을 지정합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 이미지 형식                 | <p>결과물로 사용할 이미지 파일의 형식을 지정합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 압축 & 결합                | <p>압축: 결과물을 하나의 파일로 압축합니다.</p> <p>압축: 결과물을 하나의 파일로 압축합니다. 결합: 각 악공 및 악공에 속하는 결과물을 하나로 병합합니다. 일부 프로그램에서 여러 개의 파일을 불러와 작업할 수 없을 때, 파일을 하나로 병합하여 작업할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                   |
| 동일한 폴더 또는 파일이 존재할 때 옵션 | <p>내보내기 경로에 동일한 이름의 폴더 또는 파일이 있을 때 옵션을 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 내보내기 할 때 항상 물어봅니다.</li> <li>• 중복된 이름의 파일을 덮어쓰기 합니다. 기존에 저장된 결과물은 저장하지 않습니다.</li> <li>• 새로운 폴더를 만들고 내보내기 합니다.</li> </ul>                                                                                              |
| 폴더 이름 규칙               | <p>폴더 이름 규칙을 설정합니다.</p> <p>정의한 이름으로 새로운 폴더를 생성하고, 그 안에 결과 파일을 저장합니다.</p> <p>아래 정보를 사용해 규칙을 정의할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 치과 계정<br/>생성한 날짜, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 환자 이름, 케이스 이름, 파트너 이름, 환자 ID, 주문 ID</li> <li>• 기공소 계정<br/>생성한 날짜, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 환자 이름, 케이스 이름, 파트너 이름, 주문 ID</li> </ul> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 파일 이름 규칙 | <p>파일 이름 규칙을 설정합니다.<br/>아래 정보를 사용해 규칙을 정의할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 치과 계정<br/>생성한 날짜, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 환자 이름, 케이스 이름, 파트너 이름, 환자 ID, 주문 ID</li> <li>• 기공소 계정<br/>생성한 날짜, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 환자 이름, 케이스 이름, 파트너 이름, 주문 ID</li> </ul> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## 케이스 변환 도구

서로 다른 계정 사이에 케이스를 이동할 때 사용합니다.

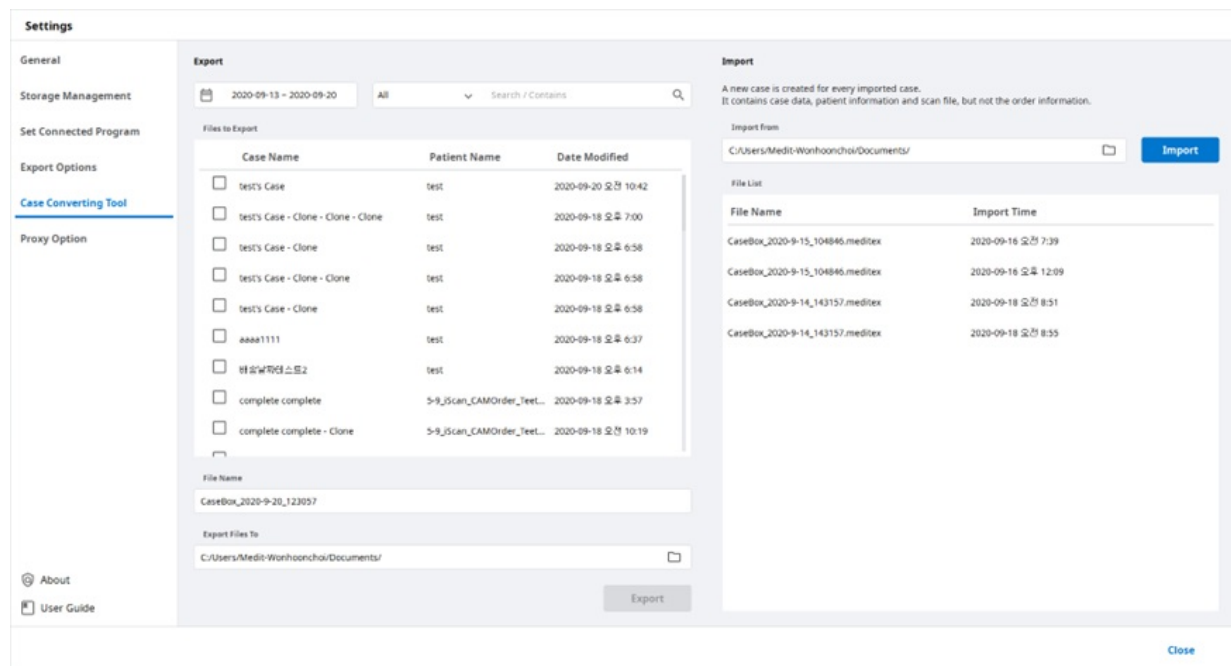


## 사용 방법

1. Medit Link를 열고 창의 왼쪽 하단에 있는 “설정” 버튼을 클릭합니다.

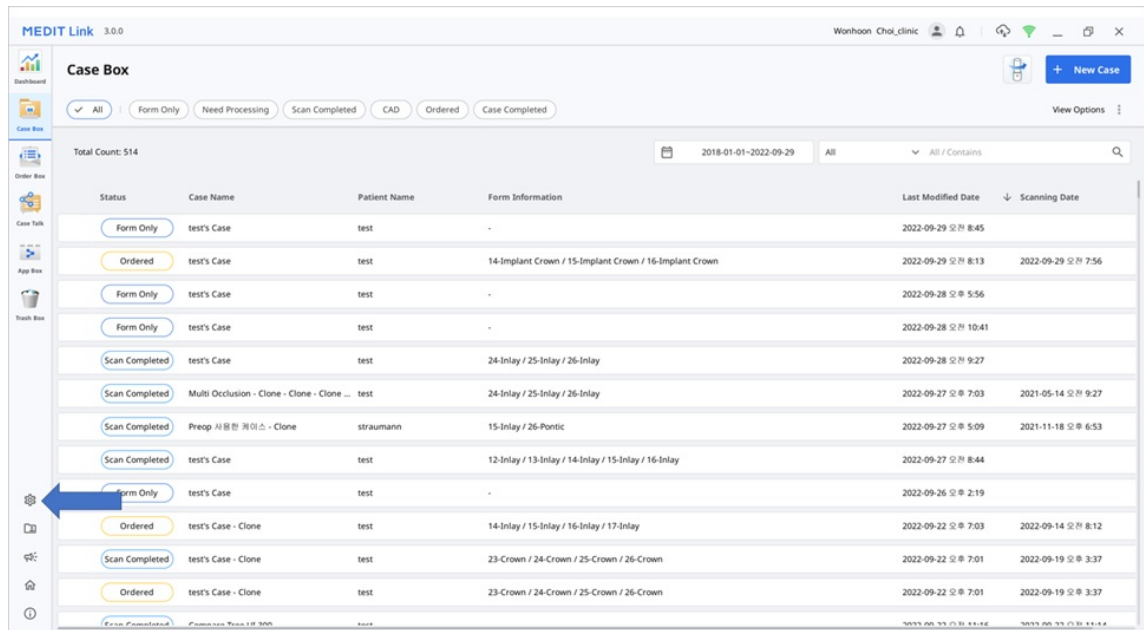


2. 아래 그림과 같이 왼쪽 메뉴에서 "케이스 변환 도구" 옵션을 선택합니다.

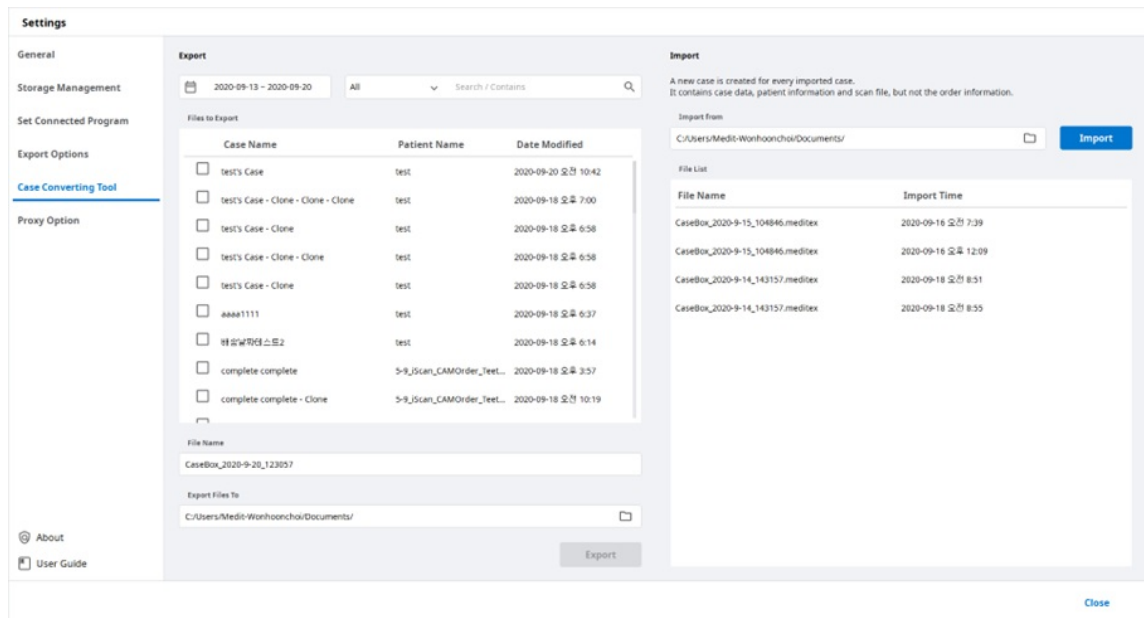

3. 가져오기 섹션에서 폴더 버튼을 클릭한 후, meditex 파일이 있는 경로를 선택합니다.

4. "가져오기" 버튼을 클릭합니다.

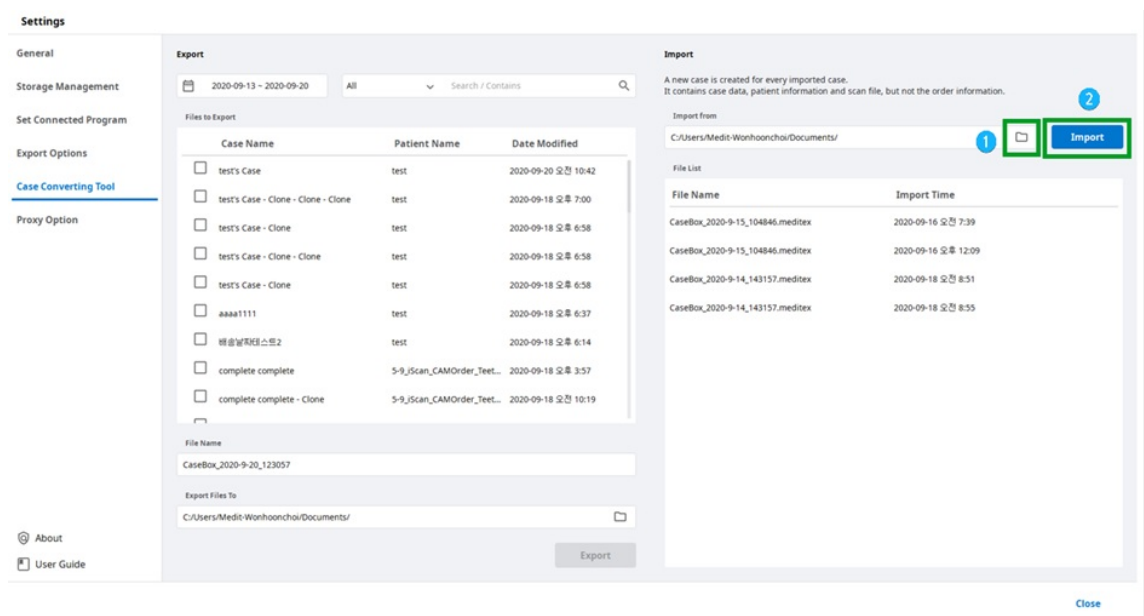

5. 가져오기가 완료되면 해당 케이스는 **Case Box** (치과 계정), 또는 **Work Box** (기공소 계정)에 생성됩니다.

## 프록시 옵션

일부 제한된 네트워크 환경에서 **Medit Link**를 원활히 사용 가능하도록 네트워크 설정을 변경할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'Proxy Option' tab selected. The 'Proxy Server' toggle is turned on. The configuration fields include: 'Proxy Server IP (or DNS)' with three input boxes, 'Proxy Server Port' with a dropdown set to '0', 'Proxy Server Scheme' with radio buttons for 'HTTP' and 'HTTPS' (selected), 'Proxy Server Username (Option)' with an input box, and 'Proxy Server Password (Option)' with an input box. At the bottom, there is a warning icon and text 'Please apply the changes.' followed by an 'Apply' button. The left sidebar contains links for 'General', 'Storage Management', 'Set Connected Program', 'Export Options', 'Case Converting Tool', 'Proxy Option' (selected), 'About', and 'User Guide'. A 'Close' button is located at the bottom right of the window.

## 제품 정보

**Medit Link**의 상세 정보를 표시합니다.

The screenshot shows the 'About' dialog box for 'MEDIT Link'. It features the product name 'MEDIT Link' in large blue letters. Below it, the version 'v 2.4.0 Build 152' and 'Dev Korea' are listed, along with the website 'https://www.medit.com/' and a copyright notice for Medit Corp. There are links for 'Terms & Conditions' and 'Open Source License'. A checkbox labeled 'Send Anonymous Usage Statistics' is checked. A large blue logo consisting of three interconnected circles is on the right. A 'Close' button is at the bottom right.

## 유저 가이드

**Medit Link**의 유저 가이드를 확인합니다.

유저 가이드를 확인하려면 인터넷 연결이 필요합니다.

## 파일 뷰어

**Medit Link**와 연동된 프로그램으로부터 획득한 데이터, 사용자가 첨부한 데이터 등 다양한 데이터를 그룹화 하여 표시합니다.


데이터 보기/숨기기, 투명도 조정, 삭제 등 기본적인 관리 기능을 제공합니다.

다음 형식의 파일에 대한 미리 보기를 지원합니다.

- 3D 모델: STL, OBJ, PLY
- 2D 이미지: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- 동영상: MKV, MP4, AVI, WMV

## 데이터 트리

데이터를 속성에 따라 그룹화 하여 표시합니다. 데이터의 보이기/숨기기, 투명도 조정, 삭제 등의 동작을 수행할 수 있는 기능을 제공합니다.




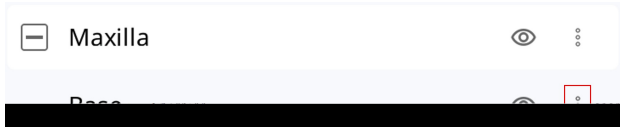
|                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 보이기/숨기기 | 데이터의 보이기/숨기기 상태를 조정할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 불투명도    | <p>데이터 트리에서 데이터를 클릭하면 다음 그림과 같이 불투명도를 조정할 수 있는 슬라이더바가 표시됩니다. “보이기” 상태인 데이터는 슬라이더바를 이용하여 투명도를 조정할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 확장 메뉴   | <p>추가로 사용할 수 있는 기능을 표시합니다.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 이 요소만 표시: 다른 데이터를 모두 숨기고 현재 데이터만 표시합니다.</li> <li>• 숨기기: 현재 데이터를 숨기기 상태로 변경합니다.</li> <li>• 복제: 데이터를 복사하여 <b>Attachment</b> 그룹에 동일한 데이터를 추가합니다.</li> <li>• 내보내기: 선택한 파일을 내보내기 합니다.</li> <li>• 이름 변경: 데이터의 이름을 변경합니다.</li> <li>• 삭제: 데이터를 삭제합니다.</li> </ul> |

### 참고

이름 변경 기능은 온라인 모드에서 사용할 수 있습니다.

## 모델 조정 도구

### 3D 모델 조정
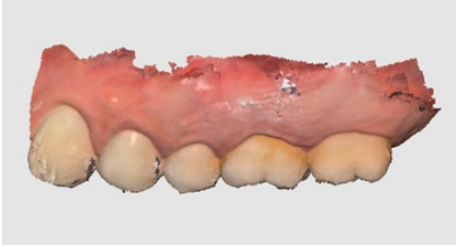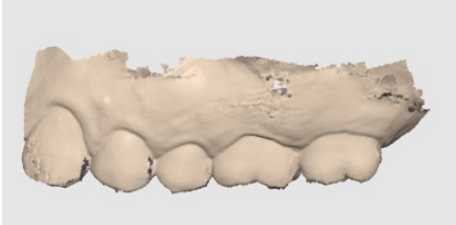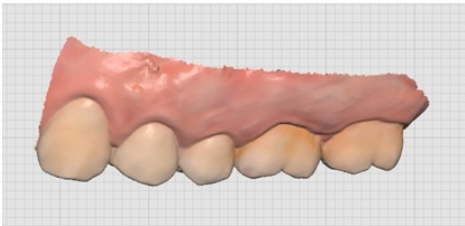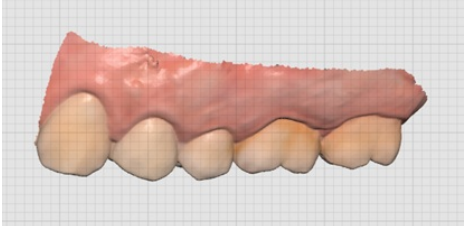
|                                                                                     |                           |                       |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 이동                        |                       | 모델을 이동합니다.                                                                                                    |
|    | 회전                        |                       | 모델을 회전합니다.                                                                                                    |
|    | 확대/축소                     |                       | 모델을 확대/축소 합니다.                                                                                                |
|    | 맞춤                        |                       | 모델이 화면 전체에 보이도록 자동 조정합니다.                                                                                     |
|    | 모델<br>보기<br>방법            | 텍스처<br>켜              | 스캔 데이터를 색상 정보와 함께 표시합니다.<br> |
|    |                           | 텍스처<br>끔              | 스캔 데이터를 색상 정보 없이 표시합니다.<br> |
|  | 그리<br>드<br>설<br>정<br>(mm) | 그리드<br>켜기             | 배경에 그리드를 표시합니다.<br>        |
|  |                           | 오버레이<br>그<br>리드<br>켜기 | 그리드를 모델 위로 표시합니다.<br>      |
|  |                           | 그리드<br>끄기             | 그리드를 표시하지 않습니다.                                                                                               |

## 2D 이미지 조정

|                                                                                     |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|  | 이전/다음<br>이미지 보<br>기 | 이전/다음 이미지를 확인합니다. |
|  | 편집                  | 이미지를 편집합니다.       |


|                                                                                   |                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>창 떼어내기/붙이기</p> | <p>이미지 창을 떼어내어 원하는 위치로 조정할 수 있습니다. 떼어낸 창의 크기를 조정할 수 있습니다.<br/>떼어낸 창을 원래 위치로 복원하면 기본 크기로 되돌아 갑니다.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 기능 도구

### 캡처 & 메모


현재 화면을 이미지로 캡처하고, 캡처한 이미지에 라인을 그리거나, 텍스트 입력을 이용해 메모를 기입합니다.

기입한 메모를 포함하여 파일로 저장할 수 있고, 저장한 이미지는 참고용 자료로 이후 프로세스에 전달할 수 있습니다.

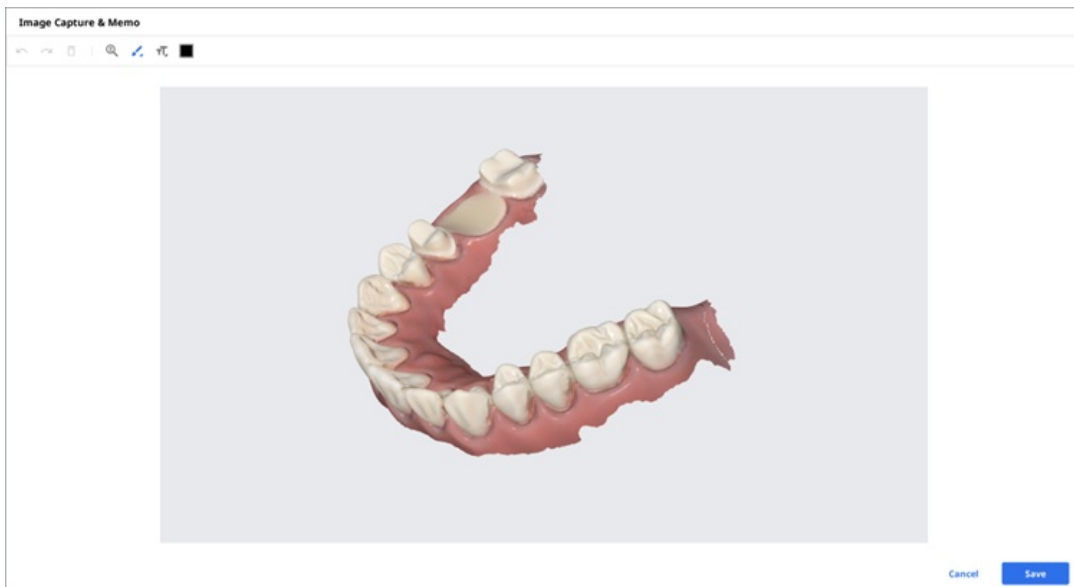

### 교정용 캡처


현재 보기 방향 및 현재 보기 방향의 상/하/좌/우에서 캡처한 이미지를 저장합니다.

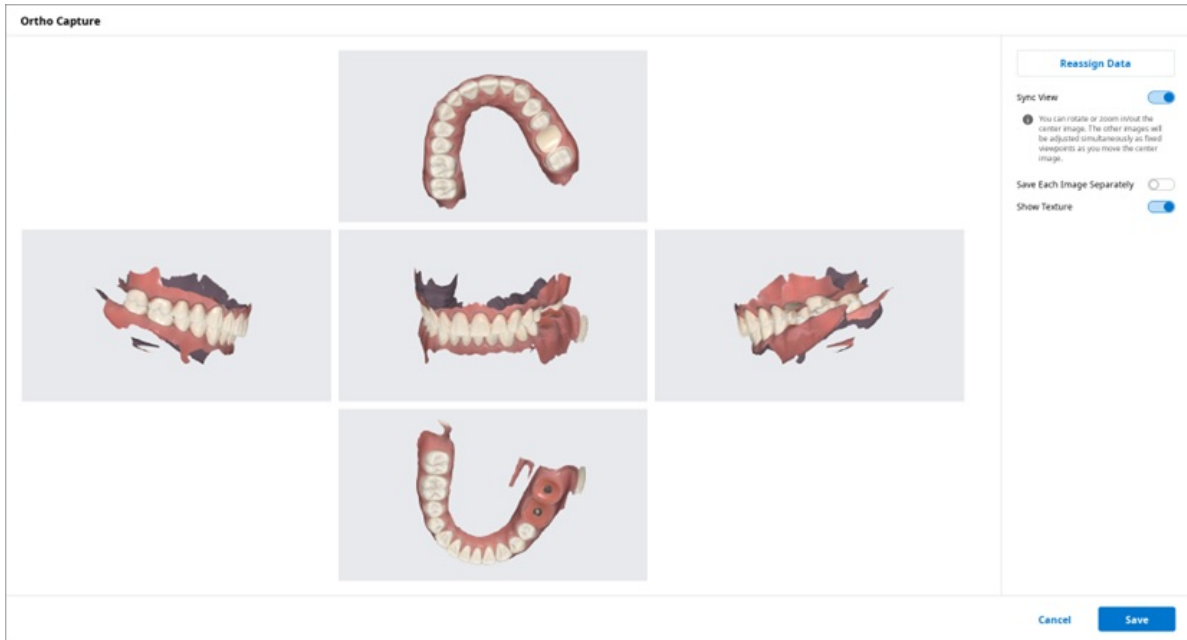

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 카메라 시점 동기화  | <p>“카메라 시점 동기화” 옵션이 켜져 있는 경우, 가운데 이미지를 회전/확대/축소할 수 있습니다. 다른 이미지는 가운데 이미지의 방향에 맞춰 자동으로 조정됩니다.</p> <p>“카메라 시점 동기화” 옵션이 꺼져 있는 경우, 모든 이미지를 개별적으로 이동/회전/확대/축소할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                               |
| 각 이미지 따로 저장 | 5장의 이미지를 개별 파일로 저장합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 텍스처 보기      | 모델의 텍스처를 켜거나 끕니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 데이터 재할당     | <p>데이터 재할당 기능을 통해서 <b>Maxilla/Mandible</b> 데이터를 변경할 수 있습니다. 변경된 데이터는 교정용 캡처 결과 이미지의 생성 및 활용에 사용됩니다.</p> <div data-bbox="408 1211 1394 1733"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>스캔 데이터: 해당 케이스의 스캔 데이터가 모두 보여집니다.</li> <li><b>Maxilla:</b> <b>Maxilla</b> 데이터로 선택된 데이터가 보여집니다.</li> <li><b>Mandible:</b> <b>Mandible</b> 데이터로 선택된 데이터가 보여집니다.</li> </ul> |


## 빈 영역 채우기

3D 모델 데이터의 빈 영역을 채워 공간이 없는 모델을 생성합니다.

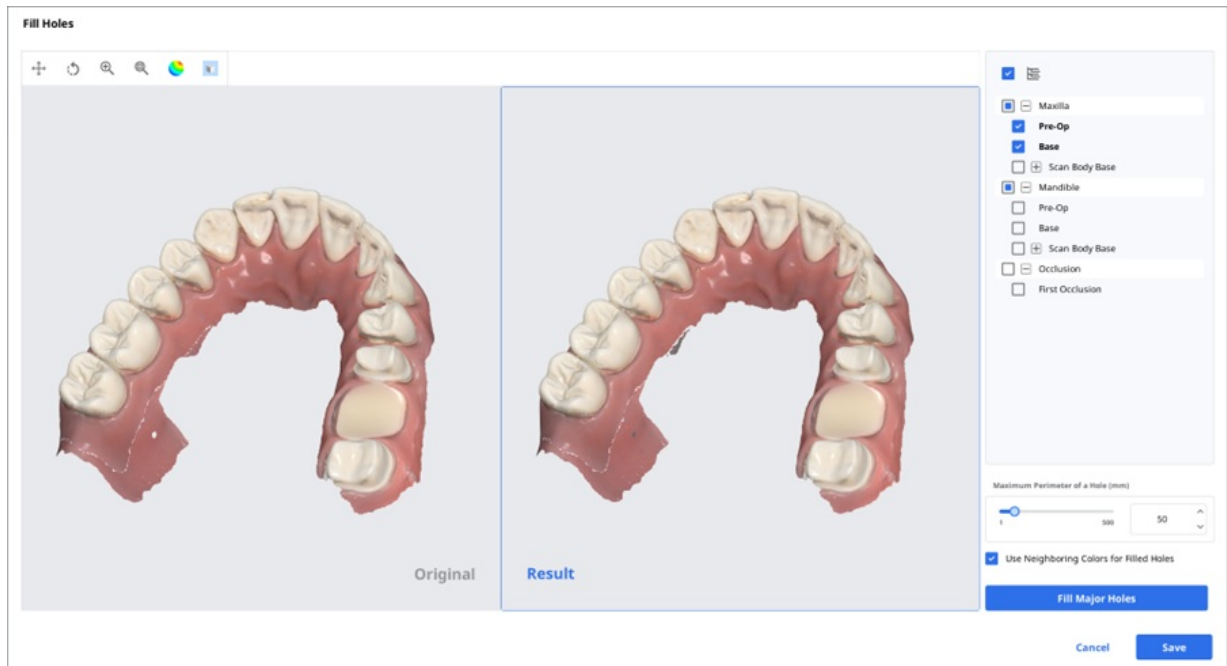

## 잘라내기

잘라내기 기능을 사용하면 **3D** 데이터에서 필요하지 않은 부분을 삭제할 수 있습니다.

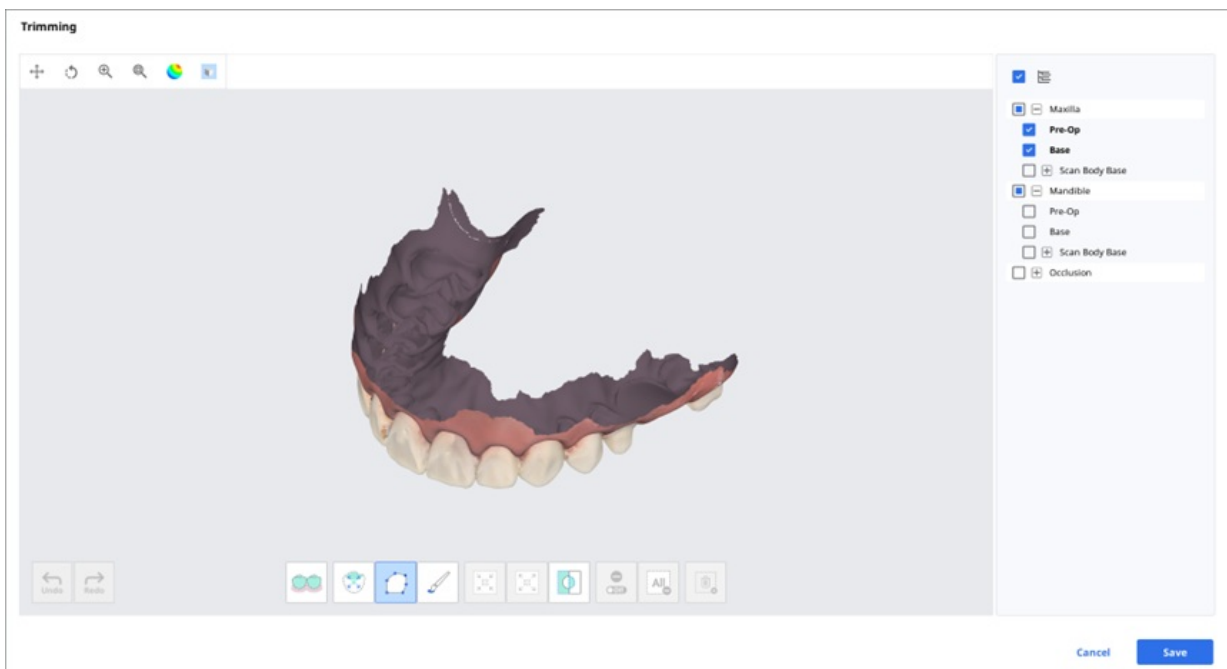


창 하단에 위치한 다양한 도구를 사용하여 선택된 영역의 **3D** 메시 데이터를 편집할 수 있습니다.

|       |                                                                                     |                     |                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 선택 모드 |  | 스마트<br>치아 영<br>역 선택 | 악궁의 모든 치아 영역을 자동으로 선택합니다.<br><br><b>참고</b><br>Medit Scan for Clinics에서 "GPU 사용" 옵션을 켜 상태에서<br>취득한 스캔 데이터에서만 이 기능을 사용할 수 있습니다. |
|       |  | 스마트<br>단일 치<br>아 선택 | 단일 치아의 영역을 자동으로 선택합니다. 마우스를 클릭하거나<br>누른 다음 치아에서 마우스를 드래그 합니다.                                                                 |
|       |  | 다각형<br>선택           | 화면에 그린 다각형 내의 데이터를 선택합니다.                                                                                                     |

|                             |                                                                                   |             |                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                             |  | 브러시 선택      | 화면에 브러시로 자유롭게 그린 영역의 데이터를 선택합니다. 데이터의 앞면만 선택이 가능합니다. 브러시는 <b>3</b> 가지 크기로 제공됩니다. |
| Adjustment of Selected Area |  | 선택 영역 축소    | 버튼을 누를 때마다 선택한 영역이 줄어 듭니다.                                                       |
|                             |  | 선택 영역 확장    | 버튼을 누를 때마다 선택한 영역이 확장됩니다.                                                        |
|                             |  | 선택 영역 반전    | 선택 영역을 반전합니다.                                                                    |
| 선택 해제 모드                    |  | 선택/선택 해제    | 편집 도구를 사용하여 선택된 영역을 해제합니다.                                                       |
|                             |  | 모든 선택 영역 해제 | 모든 영역의 선택을 해제합니다.                                                                |
|                             |  | 선택된 영역 삭제   | 선택한 영역의 데이터를 삭제합니다.                                                              |

1. 다양한 기능을 사용하여 편집할 영역을 선택합니다.

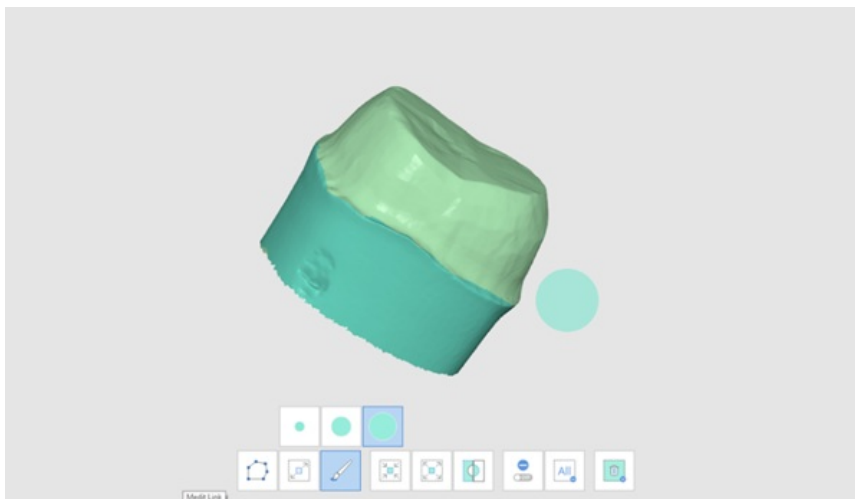


2. **참고**


"다각형 선택"은 화면에 그려진 다각형 모양 내의 모든 데이터(뒷면에 보이지 않는 데이터도 포함)를 선택합니다. "브러시 선택"은 보이는 데이터만 선택합니다.

3. 다음 도구를 사용해서 선택 영역을 축소, 확장 또는 반전 시킬 수 있습니다.


- 선택 영역 반전

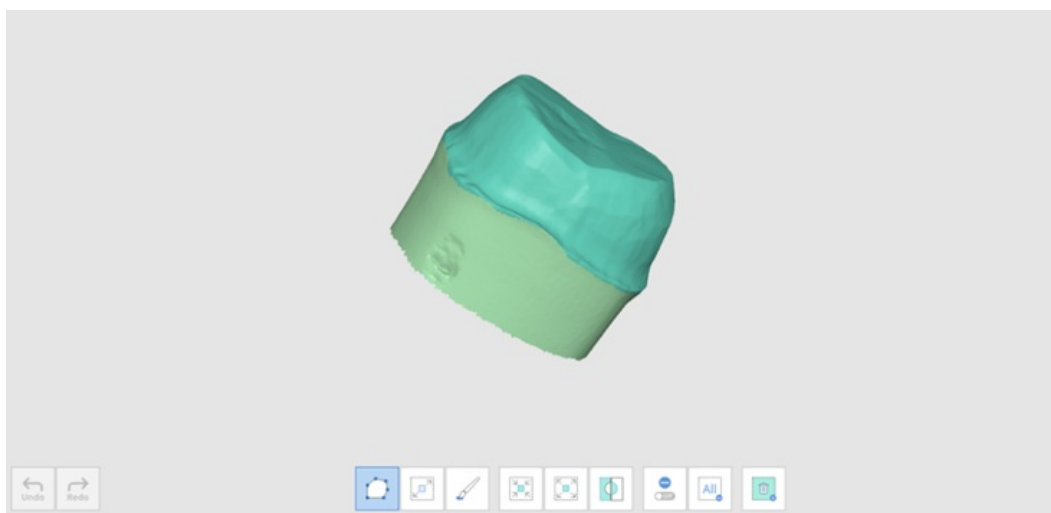

- 선택 영역 축소

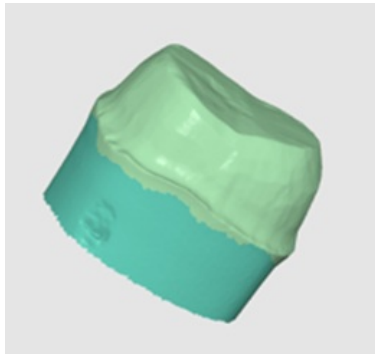

- 선택 영역 확장

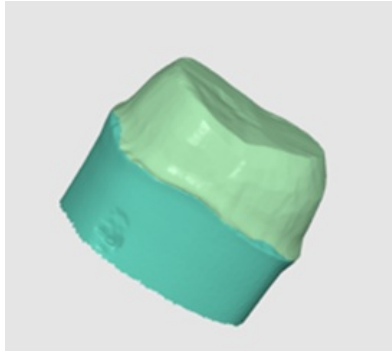




4. You can deselect the selected areas with the Delete Selected Area tool.


## 교합 정렬 최적화

교합 정렬 결과를 최적화합니다. 계산에 사용할 데이터를 선택하고, 선택한 데이터들 사이의 교합 정렬 결과를 조정할 수 있습니다.




조정 단계
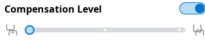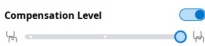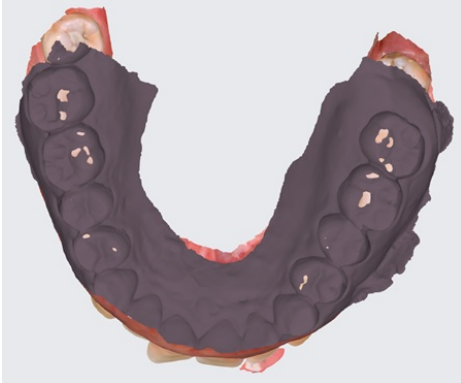
|             |                                                                                                               |                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 약<br>하<br>게 | <p>Compensation Level</p>    |    |
| 중<br>간      | <p>Compensation Level</p>    |   |
| 강<br>하<br>게 | <p>Compensation Level</p>  |  |

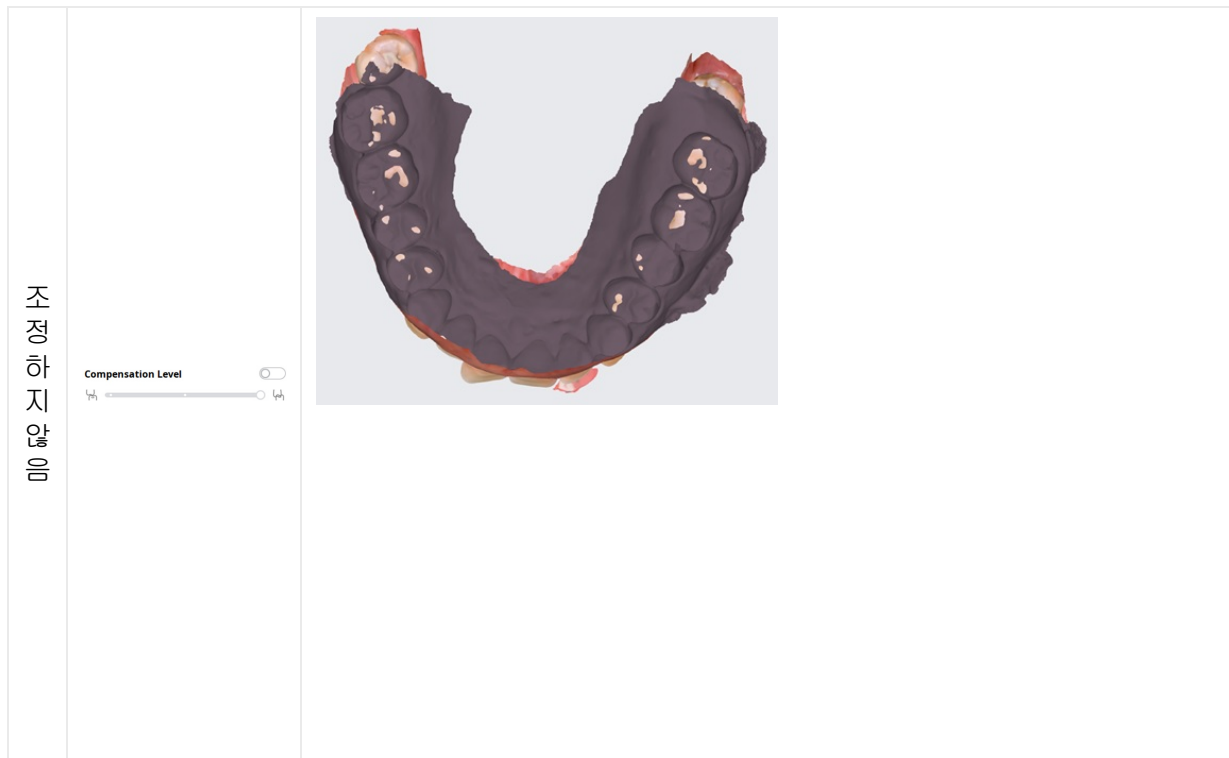

## 하악 운동

Medit Scan for Clinics에서 기록한 하악의 움직임을 재생하여 환자가 어떤 교합 상태를 가졌는지 확인할 수 있습니다.

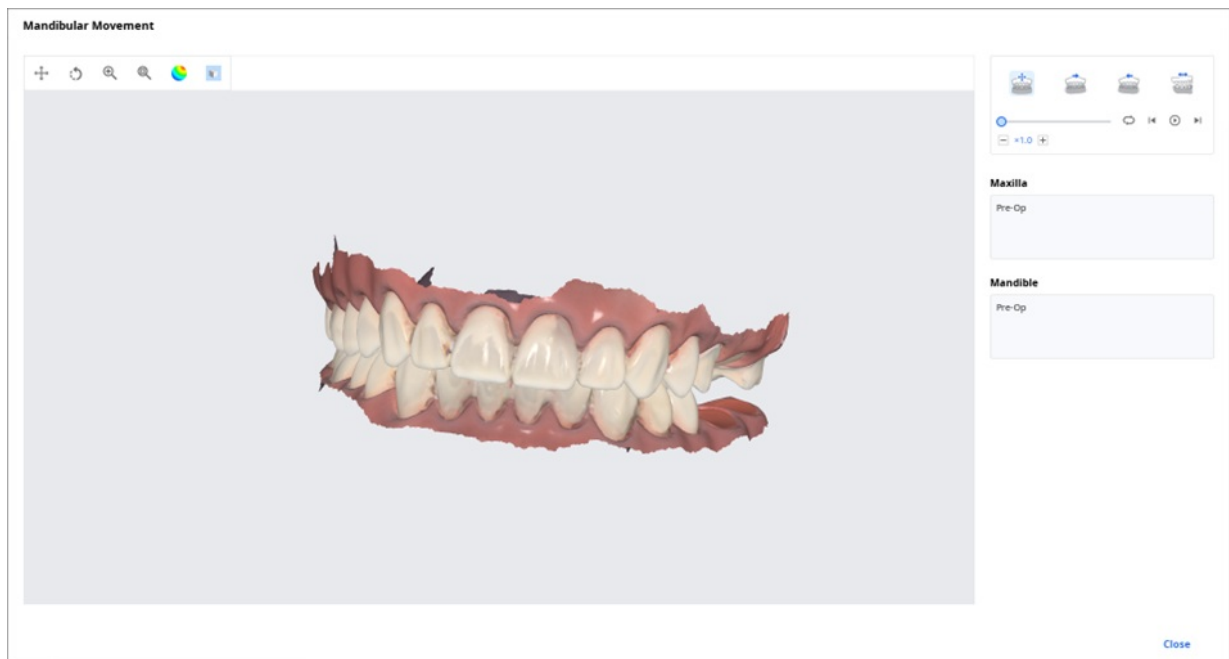

|  |        |                       |
|--|--------|-----------------------|
|  | 자유 운동  | 하악의 자유 운동 영상을 재생합니다.  |
|  | 좌측방 운동 | 하악의 좌측방 운동 영상을 재생합니다. |
|  | 우측방 운동 | 하악의 우측방 운동 영상을 재생합니다. |
|  | 전방 운동  | 하악의 전방 운동 영상을 재생합니다.  |

## 복수의 교합 결과 관리

**Medit Scan** 어플리케이션에서 복수의 교합 결과를 생성할 수 있습니다.

이 경우 "파일 뷰어"에서 여러 개의 결과물을 관리할 수 있습니다.

복수의 교합 결과 관리하는 방법


**Medit Scan** 어플리케이션에서 얻은 복수의 교합 결과물을 화면에 표시합니다.

각 교합 결과물은 이름으로 표시되고 이들 중 하나를 선택할 수 있습니다.

선택한 교합에 대한 결과가 데이터 트리 및 모델 표시 영역에 표시됩니다.



교합 결과물 선택 영역을 닫은 경우 화살표 아이콘을 이용해 교합 결과를 변경할 수 있습니다

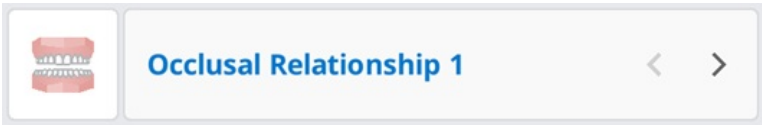

## 보기 옵션

케이스 목록의 화면 표시 방법을 사용자가 원하는 대로 변경하여 화면을 구성할 수 있습니다.

**View Options**

 **Status Filters**

6 in use >

 **Table Items**

6 in use >

 **View Type**

List View >

 **Grouping**

None >

 **Sorting**

Last Modified Date >

### 상태 필터

“보기 옵션” 창의 “상태 필터” 항목에서 케이스의 상태를 나타내는 필터링 항목을 지정할 수 있습니다. 숨겨진 필터는 **Case Box/Work Box/In Box/Order Box**의 화면에 표시되지 않습니다.

보이기한 상태 필터를 사용하여 원하는 케이스를 빠르게 확인할 수 있습니다.

**View Options**

< **Status Filters**



Shown

Hide All

Form Only



Need Processing



Scan Completed



Hidden

Show All

CAD



Ordered




Case Completed



Cancel

Apply

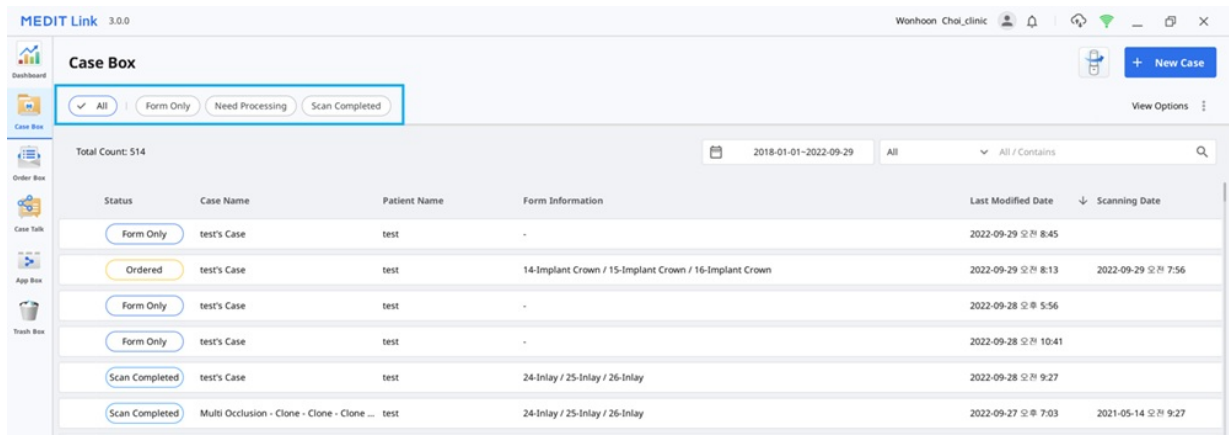

- 보기를 원하는 상태를 클릭하여 해당 상태의 케이스만 표시할 수 있습니다.
- 한 번에 여러 개의 상태를 선택할 수 있습니다.

각 박스에서 제공하는 필터링 아이템

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Case Box  | All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed |
| Order Box | All/Pending/Canceled/Rejected/Accepted/Shipped/Case Completed           |
| In Box    | All/Pending/Canceled/Rejected/Accepted/Ready/Shipped/Case Completed     |
| Work Box  | All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done                   |
| Trash Box | 제공하지 않음                                                                 |

## 테이블 항목

**Case Box/Work Box/In Box/Order Box** 의 케이스 리스트에 표시할 항목과 표시하지 않을 항목 선택할 수 있습니다. 또한 표시한 항목은 순서를 변경하거나 및 간격을 조정하여 사용자의 사용 환경에 최적화된 화면 구성이 가능합니다.

## View Options

### < Table Items



#### Shown

Hide All

- ⋮ Status
- ⋮ Case Name
- ⋮ Patient Name
- ⋮ Form Information
- ⋮ Last Modified Date
- ⋮ Scanning Date

#### Hidden

Show All

- ⋮ Birth Date
- ⋮ Order Date
- ⋮ Lab Name

Cancel

Apply

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi\_clinic

### Case Box

☒ All 
 ☐ Form Only 
 ☐ Need Processing 
 ☐ Scan Completed 
 ☐ CAD 
 ☐ Ordered 
 ☐ Case Completed 
 View Options


Total Count: 514 2018-01-01-2022-09-29 All / Contains

| Status         | Case Name                                   | Patient Name | Form Information                                       | Last Modified Date  | Scanning Date      |
|----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Form Only      | test's Case                                 | test         | -                                                      | 2022-09-29 오전 8:45  |                    |
| Ordered        | test's Case                                 | test         | 14-Implant Crown / 15-Implant Crown / 16-Implant Crown | 2022-09-29 오전 8:13  | 2022-09-29 오전 7:56 |
| Form Only      | test's Case                                 | test         | -                                                      | 2022-09-28 오후 5:56  |                    |
| Form Only      | test's Case                                 | test         | -                                                      | 2022-09-28 오전 10:41 |                    |
| Scan Completed | test's Case                                 | test         | 24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay                         | 2022-09-28 오전 9:27  |                    |
| Scan Completed | Multi Occlusion - Clone - Clone - Clone ... | test         | 24-Inlay / 25-Inlay / 26-Inlay                         | 2022-09-27 오후 7:03  | 2021-05-14 오전 9:27 |
| Scan Completed | Preop 사용된 케이스 - Clone                       | straumann    | 15-Inlay / 26-Pontic                                   | 2022-09-27 오후 5:09  | 2021-11-18 오후 6:53 |

## 목록 유형

**Case Box**에서 케이스를 표시하는 형태를 변경합니다. 갤러리 뷰 또는 리스트 뷰 두 가지의 보기 방법 중에 하나를 선택합니다.

## 갤러리 뷰

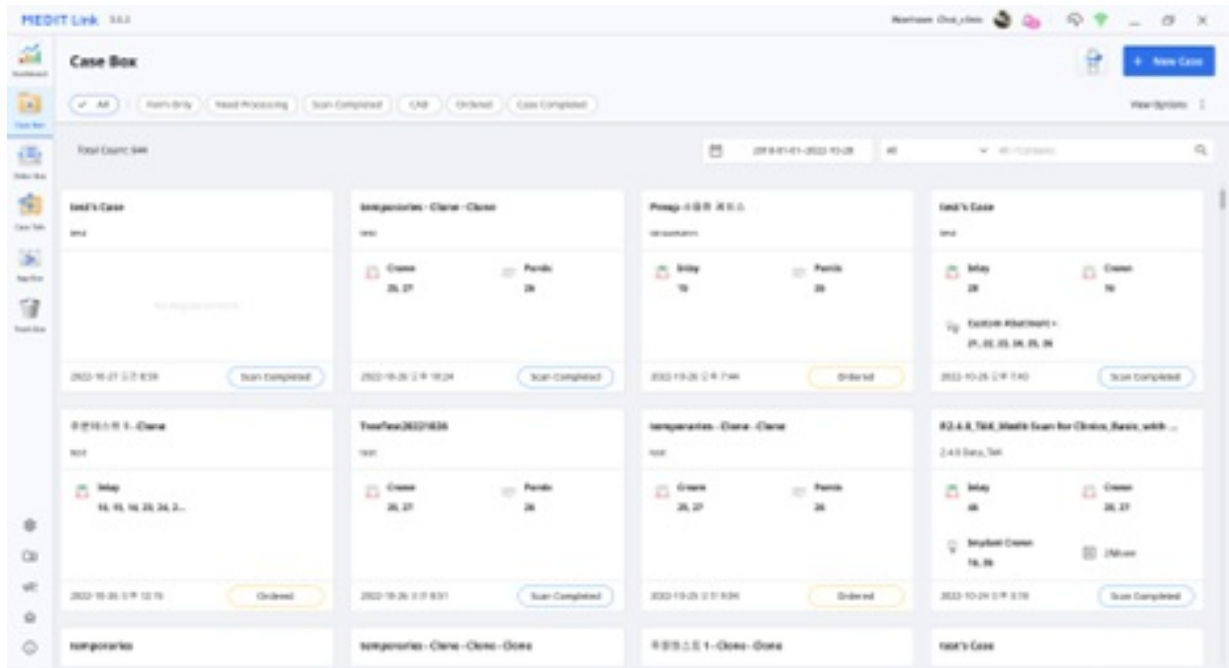

**Medit Link2.3.0 Release**

Medit Link 2.3.0
2020-09-24

**Implant Crown Zirconia**  
11, 12, 13, 14,...

**Inlay Zirconia**  
3, 4, 5, 6, 7

**Crown Metal**  
18, 19, 20, 21,...

1

2020-09-14 오전 7:43

Scan Completed

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | 케이스 이름       |
| 2 | 환자 이름 및 생년월일 |
| 3 | 품 정보         |
| 4 | 스캔한 날짜       |
| 5 | 케이스 상태       |

## 리스트 뷰

| Status         | Case Name   | Patient Name | Appointment Information                         | Last Modified Date  | Scanning Date       | Lab Name      |
|----------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Scan Completed | Head's Case | seo          | -                                               | 2022-10-26 17:13:02 |                     |               |
| Scan Completed | Head's Case | seo          | 25-Case / 26-Case / 27-Case                     | 2022-10-27 17:13:02 |                     |               |
| Scan Only      | Head's Case | seo          | -                                               | 2022-10-27 17:13:02 |                     |               |
| Scan Only      | Head's Case | seo          | -                                               | 2022-10-27 17:13:02 |                     |               |
| Scan Completed | Head's Case | seo          | 12-Case / 13-Case / 14-Case / 15-Case           | 2022-10-27 17:13:02 |                     |               |
| Scan Only      | Head's Case | seo          | -                                               | 2022-10-27 17:13:02 |                     |               |
| Scan Only      | Head's Case | seo          | -                                               | 2022-10-27 17:13:02 |                     |               |
| Scan Only      | Head's Case | seo          | -                                               | 2022-10-27 17:13:02 |                     |               |
| Ordered        | Head's Case | seo          | 16-Case / 17-Case / 18-Case                     | 2022-10-27 17:13:02 |                     | Whosecase Lab |
| Scan Completed | Head's Case | seo          | 19-Case / 20-Case / 21-Case                     | 2022-10-27 17:13:02 | 2022-10-27 17:13:02 |               |
| Scan Completed | Head's Case | seo          | 22-Case / 23-Case / 24-Case / 25-Case / 26-Case | 2022-10-27 17:13:02 | 2022-10-27 17:13:02 |               |
| Scan Completed | Head's Case | seo          | -                                               | 2022-10-27 17:13:02 |                     |               |
| Scan Completed | Head's Case | seo          | -                                               | 2022-10-27 17:13:02 | 2022-10-27 17:13:02 |               |

## 그룹화 방법

전체 케이스를 선택한 방법으로 그룹화 하여 표시합니다.

View Options

Status Filters3 in use >

Table Items6 in use >

View TypeList View >

GroupingNone v

None

Patient Name

Order Date

Scanning Date

SortingLast Modified Date >

각 박스에 따라 다음과 같은 그룹화 방법을 제공합니다.

| Box      | 그룹화 방법  |
|----------|---------|
| Case Box | 사용하지 않음 |
|          | 환자 이름   |
|          | 스캔한 날짜  |
|          | 주문한 날짜  |
| Order    | 사용하지 않음 |
|          | 스캔한 날짜  |

|          |          |
|----------|----------|
| Box      | 주문한 날짜   |
|          | 배송 희망 날짜 |
| In Box   | 사용하지 않음  |
|          | 주문한 날짜   |
| Work Box | 배송 희망 날짜 |
|          | 코멘트 없음   |
| Work Box | 코멘트 없음   |
|          | 배송 희망 날짜 |

#### 참고

Trash Box와 Case Talk에서는 모아 보기 및 정렬 기능을 제공하지 않습니다.

## 정렬 방법

다양한 정렬 방법으로 케이스를 표시합니다.

### View Options

- Status Filters** 3 in use >
- Table Items** 6 in use >
- View Type** List View >
- Grouping** None >

### Sorting

Last Modified Date ▾

- ☐ Patient Name
- ☒ Last Modified Date
- ☐ Scanning Date
- ☐ Order Date
- ☐ Lab Name

각 박스에 따라 다음과 같은 정렬 방법을 제공합니다.

| Box      | 그룹화 방법  | 정렬 방법                                       |
|----------|---------|---------------------------------------------|
| Case Box | 사용하지 않음 | 환자 이름 / 수정한 날짜 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소 이름   |
|          | 환자 이름   | 수정한 날짜 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소 이름           |
|          | 스캔한 날짜  | 환자 이름 / 수정한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소 이름            |
|          | 주문한 날짜  | 환자 이름 / 수정한 날짜 / 스캔한 날짜 / 기공소 이름            |
|          | 코멘트 없음  | 환자 이름 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 배송 예정 날짜 / 기공소 이름 |

|           |          |                                    |
|-----------|----------|------------------------------------|
| Order Box | 스캔한 날짜   | 환자 이름 / 주문한 날짜 / 배송 예정 날짜 / 기공소 이름 |
|           | 주문한 날짜   | 환자 이름 / 스캔한 날짜 / 배송 예정 날짜 / 기공소 이름 |
|           | 배송 희망 날짜 | 환자 이름 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소 이름   |
| In Box    | 사용하지 않음  | 환자 이름 / 주문한 날짜 / 배송 예정 날짜 / 치과 이름  |
|           | 주문한 날짜   | 환자 이름 / 스캔한 날짜 / 배송 예정 날짜 / 치과 이름  |
|           | 배송 희망 날짜 | 환자 이름 / 주문한 날짜 / 치과 이름             |
| Work Box  | 사용하지 않음  | 환자 이름 / 수정한 날짜 / 배송 예정 날짜 / 치과 이름  |
|           | 배송 희망 날짜 | 환자 이름 / 수정한 날짜 / 치과 이름             |

#### 참고

Trash Box와 Case Talk에서는 모아 보기 및 정렬 기능을 제공하지 않습니다.

## 필터링 및 검색

### 기간 설정을 통한 필터링

설정된 기간 내의 케이스를 필터링하여 표시합니다.

1. 기간 설정 필터를 클릭합니다.



2. 목록에서 원하는 기간을 선택합니다.

Last 30 Days

From

To

2020-08-21

2020-09-20

- 전체: 모든 케이스를 표시합니다.
- 직접 설정: 시작 날짜와 종료 날짜를 지정하면 이 기간 내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 오늘: 오늘 수정된 케이스를 표시합니다.
- 어제: 어제 수정된 케이스를 표시합니다.
- 최근 7일: 오늘을 제외한 7일 이내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 최근 30일: 오늘을 제외한 30일 이내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 이번 달: 이번 달에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 지난 달: 지난 달에 수정된 케이스를 표시합니다.

케이스 목록은 선택한 기간 내에 생성되거나 마지막으로 수정된 케이스를 실시간으로 반영합니다.

### 고급 검색 기능을 이용한 필터링

검색 기능을 활용하여 빠르게 원하는 정보를 표시합니다.

All Search / Contains

각 **Box**마다 다음과 같은 검색 옵션을 제공합니다.

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Case Box              | 전체, 케이스 이름, 환자 이름, 환자 ID, 품 정보, 기공소명   |
| Order Box             | 전체, 케이스 이름, 환자 이름, 환자 ID, 기공소명, 주문 아이디 |
| In Box                | 전체, 케이스 이름, 환자 이름, 치과명, 주문 아이디         |
| Work Box              | 전체, 케이스 이름, 환자 이름, 품 정보, 치과명, 주문 아이디   |
| Case Talk             | Case Talk 이름(포함), 환자 이름 (일치)           |
| Trash Box<br>(클리닉 계정) | 전체, 케이스 이름, 환자 이름, 기공소명, 삭제한 사용자       |
| Trash Box<br>(랩 계정)   | 전체, 케이스 이름, 환자 이름, 치과명, 삭제한 사용자        |

검색 옵션 선택 뒤에 “전체” 또는 “포함”을 선택하면, 해당 검색 옵션과 일치하는 검색 결과 또는 해당 검색 옵션을 포함한 검색 결과만을 확인할 수 있습니다.

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains


☐ Equals

## 케이스 생성/편집/복제/삭제

### 케이스 생성

#### Case Box에서 케이스 생성 (치과 계정)

- 오른쪽 상단의 "새 케이스"를 클릭합니다.

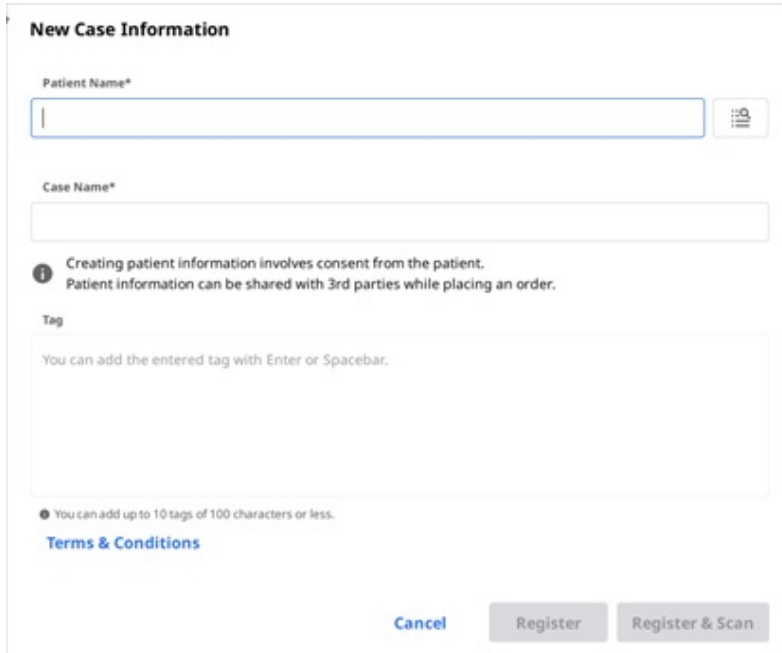

The 'New Case Information' form contains the following fields and elements:


- Patient Name\***: A text input field with a search icon on the right.
- Case Name\***: A text input field.
- Information**: A note stating 'Creating patient information involves consent from the patient. Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.'
- Tag**: A text area with the instruction 'You can add the entered tag with Enter or Spacebar.'
- Footer**: Includes a note 'You can add up to 10 tags of 100 characters or less.', a link for 'Terms & Conditions', and three buttons: 'Cancel', 'Register', and 'Register & Scan'.

- 환자 이름, 케이스 이름 등 기본 정보를 입력합니다.

- 환자 리스트에 없는 이름을 입력하면 새로운 환자가 생성됩니다.
- 환자 리스트에 있는 이름을 입력하면 리스트에서 선택할 수 있습니다.
- 환자 목록 버튼을 이용해 기존 등록했던 환자를 선택할 수 있습니다.



- 새로운 환자를 등록 또는 기존 환자의 정보를 편집한 후 선택할 수 있습니다.

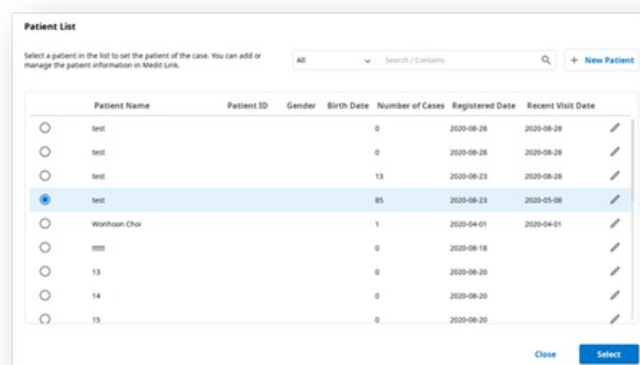

The 'Patient List' table displays the following data:


|                                  | Patient Name | Patient ID | Gender | Birth Date | Number of Cases | Registered Date | Recent Visit Date |  |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 0               | 2020-08-28      | 2020-08-28        |  |
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 0               | 2020-08-28      | 2020-08-28        |  |
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 13              | 2020-08-23      | 2020-08-28        |  |
| <input checked="" type="radio"/> | test         |            |        |            | 85              | 2020-08-23      | 2020-05-08        |  |
| <input type="radio"/>            | Worhoun Choi |            |        |            | 1               | 2020-04-01      | 2020-04-01        |  |
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 0               | 2020-08-18      |                   |  |
| <input type="radio"/>            | 13           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |  |
| <input type="radio"/>            | 14           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |  |
| <input type="radio"/>            | 15           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |  |

Buttons: Close, Select

- 환자 이름을 참고한 케이스 이름이 기본으로 지정됩니다.
  - 케이스 생성 후 바로 품 입력 및 스캔 작업을 진행하고 싶은 경우 "등록&스캔"을 클릭합니다.
- 등록**: 케이스 등록 후 품 입력 화면으로 이동합니다.
  - 등록&스캔**: Case Box의 메인 페이지로 다시 이동합니다. 여러 환자의 케이스를 등록할 때 유용합니다.

## Work Box에서 케이스 생성 (기공소 계정)

1. 오른쪽 상단의 "새 케이스"를 클릭합니다.

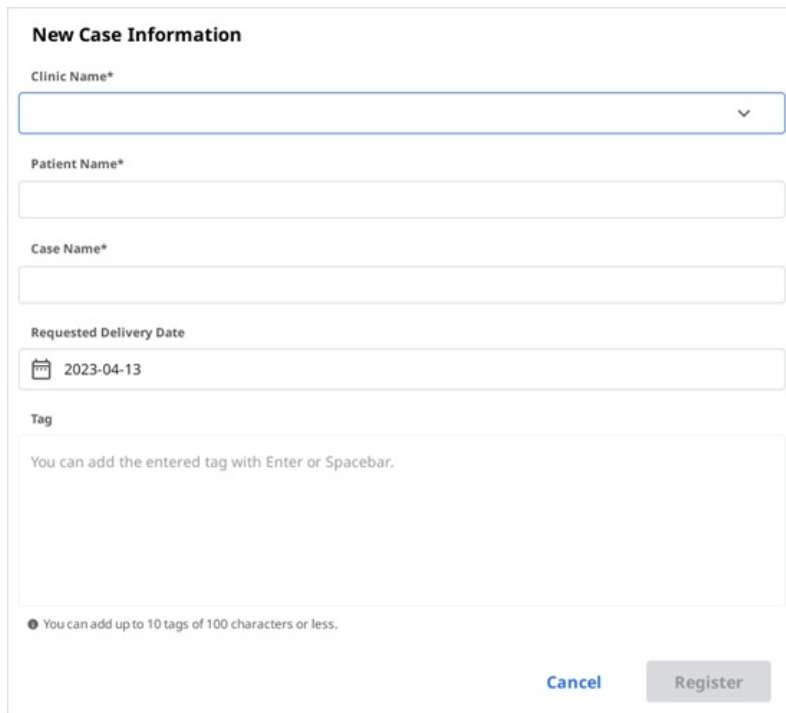

The form titled "New Case Information" contains the following fields and elements:


- Clinic Name\***: A dropdown menu.
- Patient Name\***: A text input field.
- Case Name\***: A text input field.
- Requested Delivery Date**: A date picker showing "2023-04-13".
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- Buttons: "Cancel" and "Register".

2. 거래처(치과) 이름을 입력 또는 선택합니다.
3. 환자 이름 및 케이스 이름을 입력합니다. 환자 이름을 참고한 케이스 이름이 기본으로 지정됩니다. 사용자가 원하는 케이스 이름으로 변경할 수 있습니다.
4. 기공물 제작 완료일을 고려한 배송 예정 날짜를 입력합니다.
5. 케이스 등록 후 초기 페이지로 이동합니다.

## 케이스 정보 편집

### Case Box에서 케이스 정보 편집 (치과 계정)

1. 케이스 이름 우측의 "편집" 아이콘을 클릭합니다.

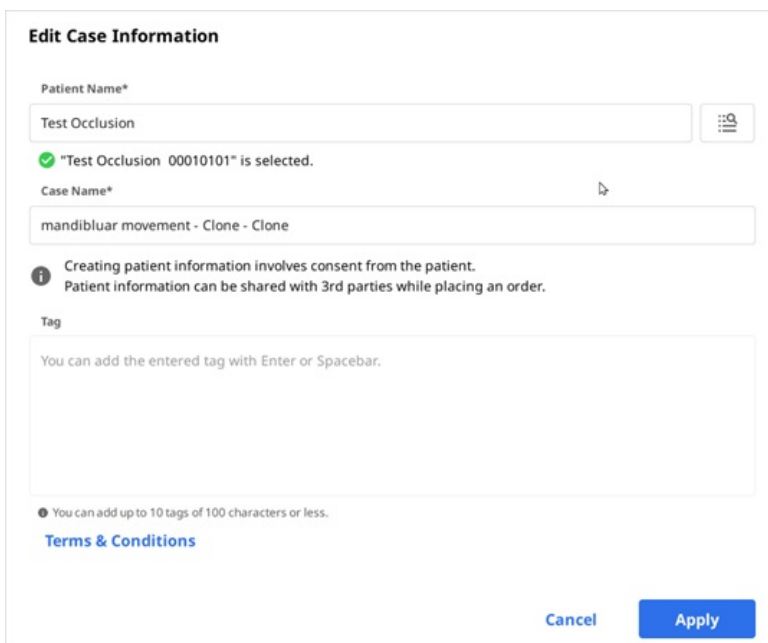

The form titled "Edit Case Information" contains the following fields and elements:

- Patient Name\***: A text input field containing "Test Occlusion" with a search icon on the right.
- Case Name\***: A text input field containing "mandibular movement - Clone - Clone".
- Tag**: A text area with the instruction "You can add the entered tag with Enter or Spacebar." and a note "You can add up to 10 tags of 100 characters or less."
- Terms & Conditions**: A link.
- Buttons: "Cancel" and "Apply".

2. 환자 이름 우측의 "검색" 아이콘을 클릭합니다. 환자 이름은 직접 수정할 수 없고, 변경을

원하는 환자를 목록에서 선택할 수 있습니다. 목록에서 환자 정보를 수정할 수 있습니다.

**Patient List**

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

|                                  | Patient Name | Patient ID | Gender | Birth Date | Number of Cases | Registered Date | Recent Visit Date |  |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 0               | 2020-08-28      | 2020-08-28        |  |
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 0               | 2020-08-28      | 2020-08-28        |  |
| <input checked="" type="radio"/> | test         |            |        |            | 13              | 2020-08-23      | 2020-08-28        |  |
| <input type="radio"/>            | test         |            |        |            | 85              | 2020-08-23      | 2020-05-08        |  |
| <input type="radio"/>            | Wonhoon Choi |            |        |            | 1               | 2020-04-01      | 2020-04-01        |  |
| <input type="radio"/>            | ttttt        |            |        |            | 0               | 2020-08-18      |                   |  |
| <input checked="" type="radio"/> | 13           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |  |
| <input type="radio"/>            | 14           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |  |
| <input type="radio"/>            | 15           |            |        |            | 0               | 2020-08-20      |                   |  |

Close Select

3. 변경하고자 하는 환자 이름을 선택합니다.
4. 새로운 환자를 추가하려면, "새 환자"를 클릭합니다.
5. 편집 버튼을 이용해 기존 환자의 정보를 수정한 후 선택할 수 있습니다.
6. 케이스 이름 수정 후 "적용"을 클릭하여 변경 내용을 적용합니다.

## Work Box에서 케이스 정보 편집 (기공소 계정)

1. 케이스 이름 오른쪽의 "편집" 아이콘을 클릭하면 다음 화면이 표시됩니다

**Edit Case Information**

Clinic Name\*

test

Patient Name\*

test

Case Name\*

test's Case

Requested Delivery Date

2022-04-18

Tag

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel Apply

2. 정보를 수정한 후 "적용"을 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.

### 참고

In Box로부터 전달받은 케이스의 정보는 수정할 수 없습니다.


## 케이스 복제

### Case Box에서 케이스 복제 (치과 계정)

1. "복제" 버튼을 클릭합니다.



2. 새로운 케이스에 어떤 정보를 복제할 지 선택할 수 있습니다

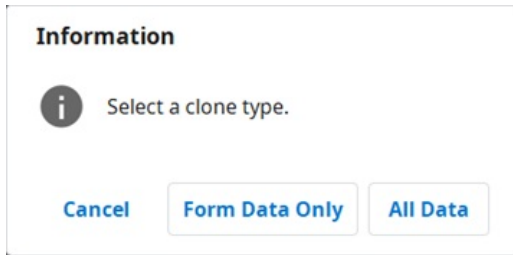

The dialog box is titled "Information" and contains an information icon (i) followed by the text "Select a clone type." Below this text are three buttons: "Cancel", "Form Data Only", and "All Data".

3. 모든 데이터를 복제하여 새 케이스를 생성합니다. 복제가 완료되면, "케이스 이름 - Clone"으로 새 케이스가 생성됩니다.
4. 복제가 완료되면, "케이스 이름 - Clone"으로 새 케이스가 생성됩니다.

### Work Box에서 케이스 복제 (기공소 계정)

1. "복제" 버튼을 클릭합니다.



2. 모든 데이터를 복제하여 새 케이스를 생성합니다.
3. 복제가 완료되면, "케이스 이름 - Clone"으로 새 케이스가 생성됩니다.


### 케이스 삭제

#### 케이스 삭제 (치과 계정, 기공소 계정)

1. "삭제" 버튼을 클릭합니다.



2. "확인"을 클릭하면 케이스가 삭제됩니다.

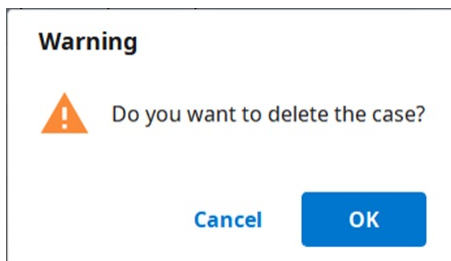

The dialog box is titled "Warning" and contains a warning icon (triangle with exclamation mark) followed by the text "Do you want to delete the case?". Below this text are two buttons: "Cancel" and "OK".

3. 삭제한 케이스는 **Trash Box**로 이동되고 필요하면 다시 복구할 수 있습니다.

## 폼 정보

선택한 프로그램 및 치료 유형에 맞는 치식 정보를 입력할 수 있습니다.

입력한 정보는 스캔, 캐드 및 주문을 위한 기본 정보로 사용됩니다.

### Case Box에서 치식 정보 입력

#### 폼 탭에서 치식 정보 입력

1. 치아/악궁 중 치료를 원하는 치식 입력 방법을 선택합니다.
2. 유형 - 방식 - 재료 - 세이드를 선택합니다.
  - 정보를 잘못 입력한 경우 이전 탭을 클릭하여 다시 선택할 수 있습니다.
  - 모든 선택 사항은 자동으로 상품 목록으로 등록됩니다.
3. "저장"을 클릭하여 설정 사항을 저장합니다.

#### CAD 탭에서 치식 정보 입력

1. 치아/플렉시블 멀티다이/멀티다이 중 사용할 치식 입력 방법을 선택합니다.
2. 치료할 치아 번호/악궁/다이 번호를 선택합니다.
3. 상세 옵션 및 캐드 작업을 위한 설정값을 정의합니다.
4. "확인"을 클릭하여 설정 사항을 저장합니다.
  - 저장한 정보는 저장 목록에 표시됩니다.
5. "저장"을 클릭하여 설정 사항을 저장합니다.

### Work Box에서 치식 정보 입력

#### 폼 탭에서 치식 정보 입력

1. 사용할 스캔 프로그램을 선택합니다.
2. 치아/악궁/플렉시블 멀티다이/멀티다이 중 사용할 치식 입력 방법을 선택합니다.
3. 선택한 스캔 프로그램에 따라 서로 다른 치식 입력 방법을 제공합니다.

|              | Medit<br>Scan for<br>Clinics | Medit<br>Scan for<br>Labs |
|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 치아           | O                            | O                         |
| 악궁           | O                            | O                         |
| 플렉시블<br>멀티다이 | X                            | O                         |
| 멀티다이         | X                            | O                         |

4. 치료할 치아 번호/악궁/다이 번호를 선택합니다.
5. 유형 - 방식 - 재료 - 세이드를 선택합니다.
  - 정보를 잘못 입력한 경우 이전 탭을 클릭하여 다시 선택할 수 있습니다.
  - 모든 선택 사항은 자동으로 상품 목록으로 등록됩니다.
6. "저장"을 클릭하여 설정 사항을 저장합니다.

## CAD 탭에서 치식 정보 입력

1. 치아/플렉시블 멀티다이/멀티다이 중 사용할 치식 입력 방법을 선택합니다.
2. 치료할 치아 번호/악궁/다이 번호를 선택합니다.
3. 상세 옵션 및 캐드 작업을 위한 설정값을 정의합니다.
4. "확인"을 클릭하여 설정 사항을 저장합니다.
  - 저장한 정보는 저장 목록에 표시됩니다.
5. "저장"을 클릭하여 설정 사항을 저장합니다.

## 브릿지 설정

선택된 치아에 같은 정보가 적용된 경우 브릿지 정보를 입력할 수 있습니다. 동일한 재료의 상품이 인접한 경우 브릿지를 설정할 수 있는 UI가 제공됩니다. 브릿지 아이콘을 클릭하여 브릿지를 설정/해제할 수 있습니다.



## 스캔 옵션 설정

연동하는 프로그램에 따라 다음과 같은 스캔 옵션을 제공합니다.

선택한 스캔 옵션은 각 스캔 프로그램에 전달되어 스캔 작업에 필요한 전략을 표시합니다.

### Medit Scan for Labs

#### 일반 옵션

|                                                                                     |         |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
|  | 인접치     | 프렙 치아와 인접치아를 분류/설정하고 이 정보를 스캔 프로그램에 전달합니다.     |
|  | 대합치     | 대합치를 자동으로 분류/설정하고 이 정보를 스캔 프로그램에 전달합니다.        |
|  | 교합기 사용  | 스캔 프로그램에서 교합기 선택을 위한 옵션을 표시합니다.                |
|  | 무브먼트 마커 | 스캔 프로그램에서 <b>Jaw Motion</b> 스캔 전략을 사용할 수 있습니다. |

#### 치아 별 적용 옵션

|                                                                                     |          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|  | 스캔 바디 스캔 | 스캔 프로그램에서 스캔바디 스캔 전략을 사용할 수 있습니다.  |
|  | 진단 모델 스캔 | 스캔 프로그램에서 진단 모델 스캔 전략을 사용할 수 있습니다. |
|  | 왁스업 스캔   | 스캔 프로그램에서 왁스업 스캔 전략을 사용할 수 있습니다.   |

## 상품 즐겨 찾기 등록 및 활용

자주 사용하는 상품의 조합을 즐겨 찾기로 등록하여 빠르게 상품을 선택할 수 있습니다.

등록한 즐겨찾기 리스트를 템플릿으로 관리하고, 내보내기 및 가져오기 기능을 통해 다른 컴퓨터와 공유할 수 있습니다.

### 즐거찾기 추가

1. 치아 번호를 선택합니다.
2. 유형 - 방식 - 재료 - 세이드를 선택합니다.
  - 유형 - 방식 - 재료 - 세이드를 모두 선택하지 않더라도 즐겨 찾기로 등록할 수 있습니다.
3. 별 아이콘을 클릭합니다.  

4. 치아 번호를 제외하고 선택한 유형 - 방식 - 재료 - 세이드 조합을 즐겨 찾기 목록에 등록합니다.

### 즐거 찾기 관리

여러 종류의 템플릿을 등록하고 관리, 공유할 수 있습니다.

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 추<br>가           | 새로운 템플릿을 추가합니다.       |
| 이<br>름<br>변<br>경 | 현재 템플릿의 이름을 변경합니다.    |
| 삭<br>제           | 현재 템플릿을 삭제합니다.        |
| 내<br>보<br>내<br>기 | 현재 템플릿을 파일로 내보내기 합니다. |
| 가<br>져<br>오<br>기 | 템플릿 파일을 가져오기 합니다.     |

## 스캔 및 CAD 작업

### 스캔 작업 진행

입력한 치식 정보를 기반으로 연동된 스캔 프로그램에 정보를 전달하고 스캔 작업을 진행할 수 있습니다.

1. 치식 정보 및 스캔 옵션을 입력/저장합니다.
2. 화면 우측 상단의 "스캔"을 클릭합니다.

### 캐드 작업 진행

Medit Link는 exocad를 지원합니다.

| CAD    | 치식 정보 입력 | 치식 정보 확인 | 캐드 직접 실행 | 캐드 결과물<br>Medit Link로 연<br>동 |
|--------|----------|----------|----------|------------------------------|
| exocad | O        | O        | O        | O                            |

1. 설정 > 연결 프로그램 관리에서 연동을 원하는 캐드 프로그램을 선택하여 간단하게 연동이 가능합니다.
2. 캐드 탭에서 작업 정보 및 디자인 옵션을 입력/저장합니다.
3. 화면 우측 상단의 "캐드"를 클릭합니다.
4. 연동된 캐드 프로그램이 실행되고 데이터를 자동으로 불러옵니다.
5. 캐드 작업 진행 후 결과물을 저장합니다.

#### 참고

Medit Link for Mac은 CAD 연동 관련 기능을 제공하지 않습니다.

## 결과 파일 얻기

### 결과 파일 내보내기


**Medit Link**는 주문을 통해 쉽게 거래처와 결과물을 공유하는 방법 이외에 내보내기 기능을 이용해 결과물을 원하는 파일 형식으로 저장할 수 있습니다.

|               |                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 내보내기 경로       | 결과물을 저장할 경로를 지정합니다.                                                                                             |
| 폴더 이름         | 새로운 폴더를 생성하고 결과물을 저장합니다. 설정한 이름 규칙으로 기본 이름이 설정됩니다. 이름은 자유롭게 변경 가능합니다. 설정 > 내보내기 옵션 > 폴더 이름 규칙에서 규칙을 변경할 수 있습니다. |
| 파일 이름         | 결과물의 이름을 정의합니다. 설정한 이름 규칙으로 기본 이름이 설정됩니다. 이름은 자유롭게 변경 가능합니다. 설정 > 내보내기 옵션 > 폴더 이름 규칙에서 규칙을 변경할 수 있습니다.          |
| 캐드 종류         | 디자인에 사용할 캐드 프로그램을 선택합니다. 각 프로그램의 기준축 정보로 결과물을 생성하여 별도의 축 맞춤 작업 없이 바로 디자인을 진행할 수 있습니다.                           |
| 메시 형식         | 결과물로 사용할 메시 파일의 형식을 지정합니다.                                                                                      |
| 이미지 형식        | 결과물로 사용할 이미지 파일의 형식을 지정합니다.                                                                                     |
| 파일 압축         | 결과물을 하나의 파일로 압축합니다.                                                                                             |
| 메시 결합         | 각 악궁 및 악궁에 속하는 결과물을 하나로 병합합니다. 일부 프로그램에서 여러 개의 파일을 불러와 작업할 수 없을 때, 파일을 하나로 병합하여 작업할 수 있습니다.                     |
| 모든 교합 관계 내보내기 | 스캔 프로그램으로부터 복수의 교합 결과가 생성된 경우 모든 교합 관계의 결과를 한 번에 내보내기 할 수 있습니다.                                                 |


## 선택한 파일 내보내기

파일 뷰어의 확장 메뉴에서 내보내기 기능을 제공합니다. 이 기능을 이용하면 필요한 파일을 쉽게 내보내기 할 수 있습니다.

1. 파일 뷰어의 그룹 또는 요소에서 "메뉴" 아이콘을 클릭합니다.
2. "내보내기"를 클릭합니다.

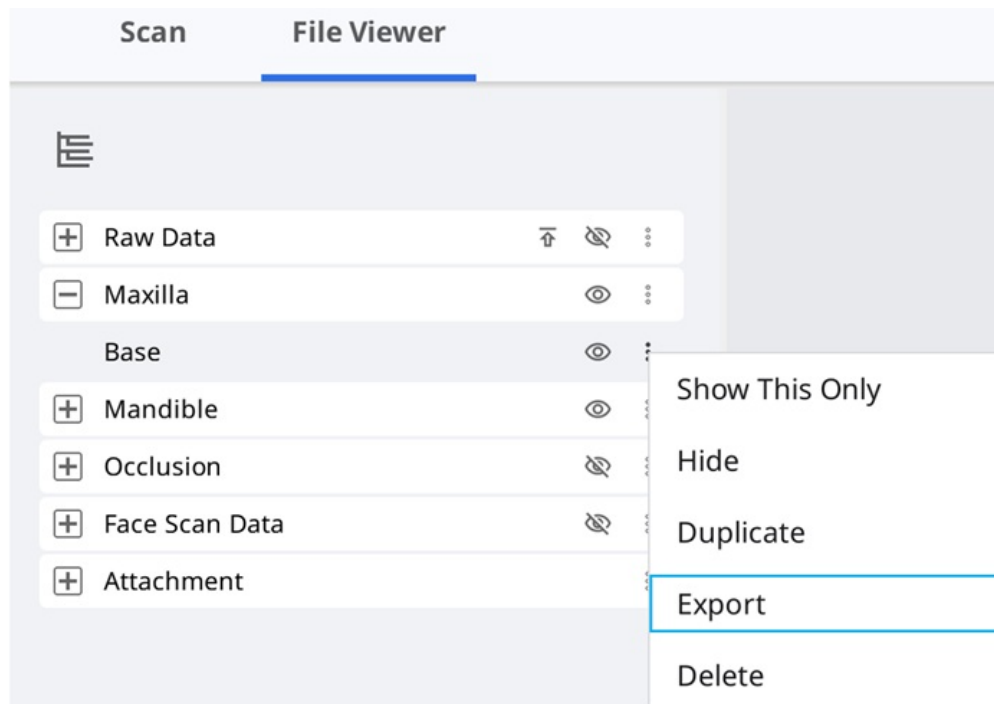

3. 내보내기 화면에서 선택한 파일만 체크된 상태로 표시됩니다.

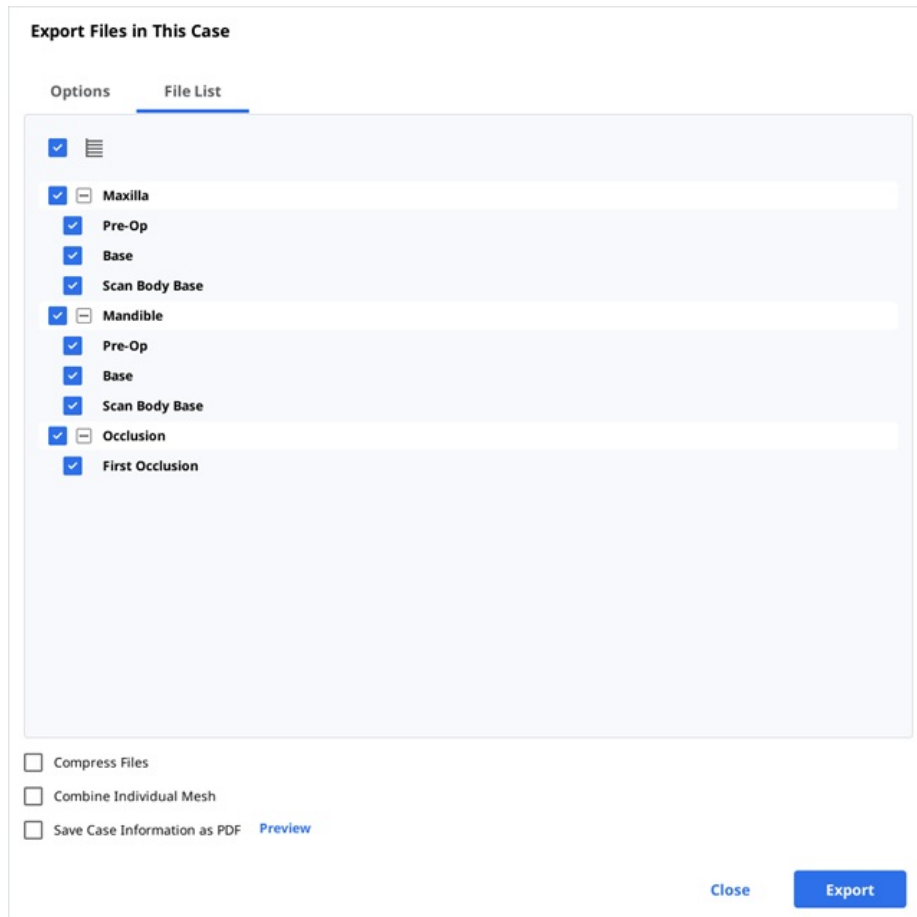

4. "내보내기"를 클릭합니다.


## 마진 라인 내보내기


Medit Link는 Medit Scan for Clinics에서 생성한 마진 라인을 CAD 프로그램으로 전달하여 활용할 수 있습니다.

### 색상 정보로서 마진라인 내보내기

일반적으로 마진 라인을 상악/하악과 함께 색상 정보로서 제공합니다. 이렇게 제공된 마진라인을 참조하여 캐드 프로그램에서 사용할 수 있는 마진라인을 생성할 수 있습니다.

예시:

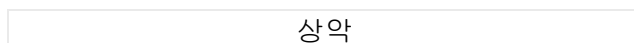

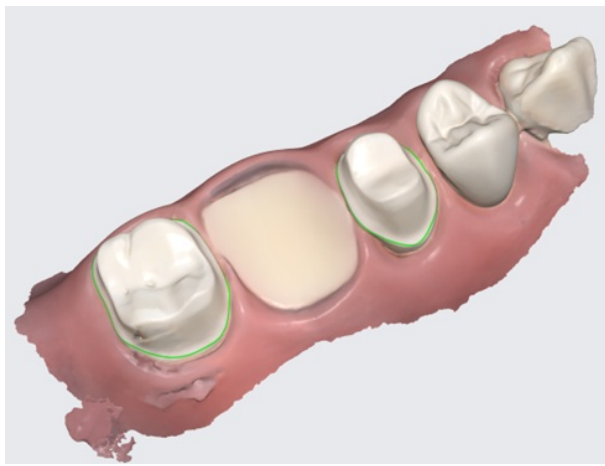

마진 라인을 색상 정보로 가지는 결과

#### 참고

이 기능은 색상 정보를 가지는 파일 형식을 사용했을 때 적용됩니다. **STL** 형식의 경우 이 기능이 적용되지 않습니다.

#### 참고

캐드 종류 > **3shape** 은 이 기능을 지원하지 않습니다.

### 파일로서 마진 라인 내보내기

마진 라인을 “~margin.xyz” 형태의 파일로서 내보내기 가능합니다.

이렇게 생성된 마진라인 파일은 **exocad**에서 추가 작업 없이 직접 읽어 활용할 수 있습니다.

예시:

|    |       |
|----|-------|
| 상악 | 마진 라인 |
|----|-------|



## 케이스 리스트를 CSV로 내보내기

케이스 리스트를 CSV 형식으로 내보내기 가능합니다.


내보내기 한 CSV 파일을 이용해 외부 프로그램을 이용해 케이스 관리가 가능합니다.

“CSV로 내보내기” 기능은 Medit Link PC 어플리케이션의 다음 메뉴에서 사용가능 합니다.

- In Box
- Work Box

케이스 리스트 내보내는 방법

1. In Box 또는 Work Box로 이동합니다.
2. 내보내기 할 케이스를 선택합니다.

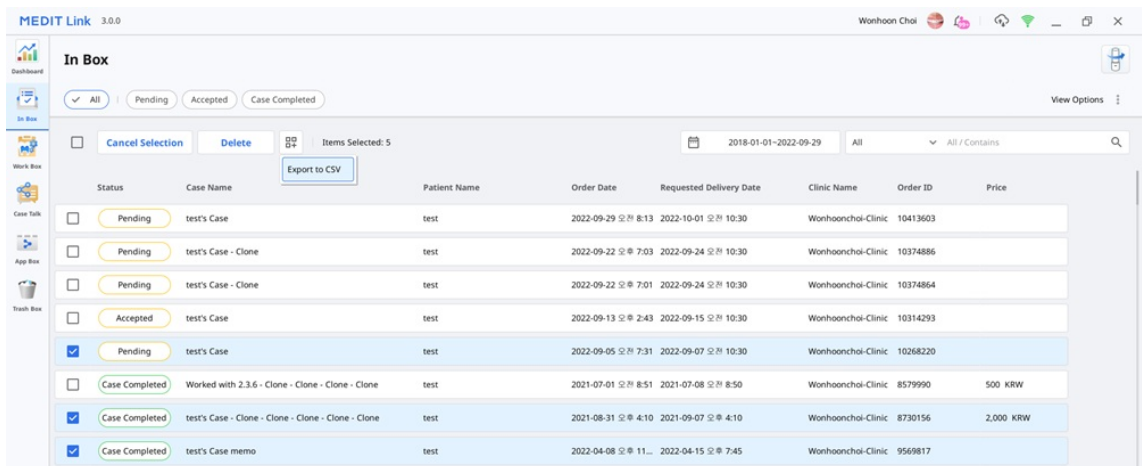

3. 확장 메뉴 버튼을 클릭하고 “CSV로 내보내기”를 클릭합니다



4. 내보내기 할 경로와 파일 이름을 정하고 결과물을 저장합니다.

## Medit Link Web 에서 파일 다운로드 하기

Medit Link 웹에서 케이스의 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

Medit Link PC 어플리케이션을 설치하지 않고 인터넷 브라우저를 이용해 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

### 참고


웹으로 부터 파일을 다운로드 하기 위해서 데이터는 반드시 **Medit** 클라우드에 업로드 되어 있어야 합니다.

다운로드 기능은 **Medit Link** 웹의 다음 메뉴에서 사용 가능합니다.

- Case Box
- Work Box
- 웹 뷰어

### Case Box/Work Box

Case Box/Work Box의 오른쪽 상단에 "다운로드" 버튼을 제공합니다.

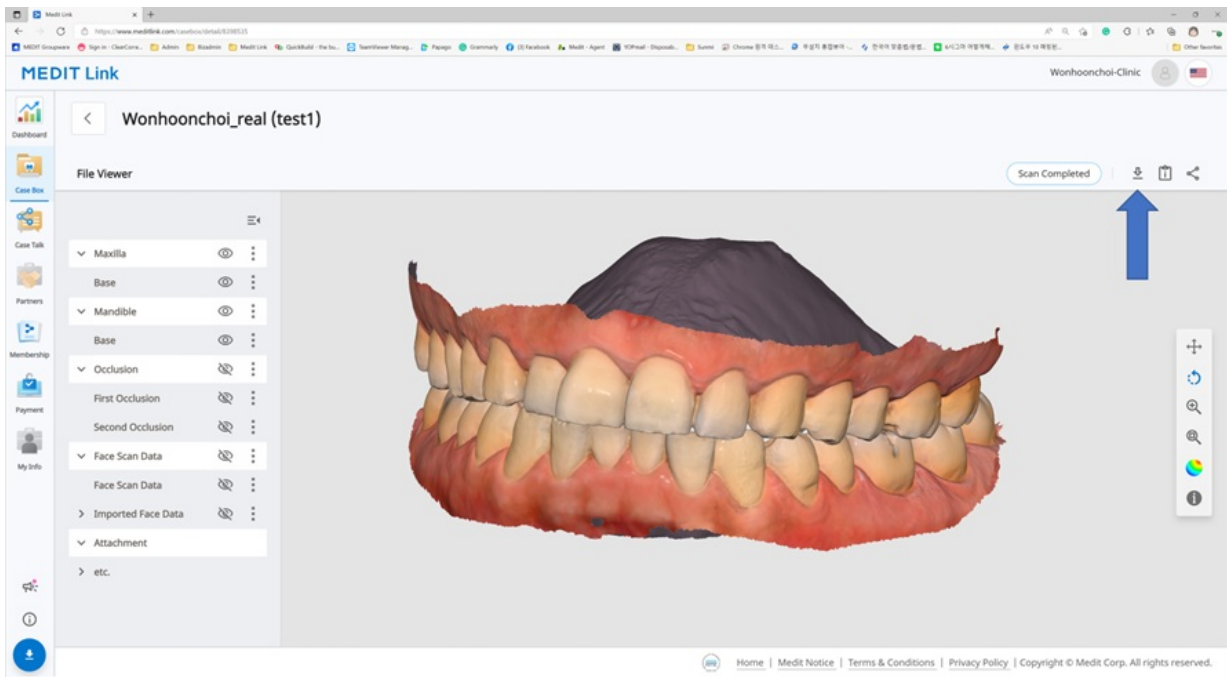


### 웹 뷰어

Case Talk을 이용해 케이스를 공유하는 경우 다운로드 허용 여부를 선택할 수 있습니다.

케이스 공유할 때 “다운로드 권한 부여”를 선택한 경우, 공유한 케이스에 접속한 사용자는 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

공유 링크에 접속한 사용자는 오른쪽 상단에서 "다운로드" 아이콘을 클릭해 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

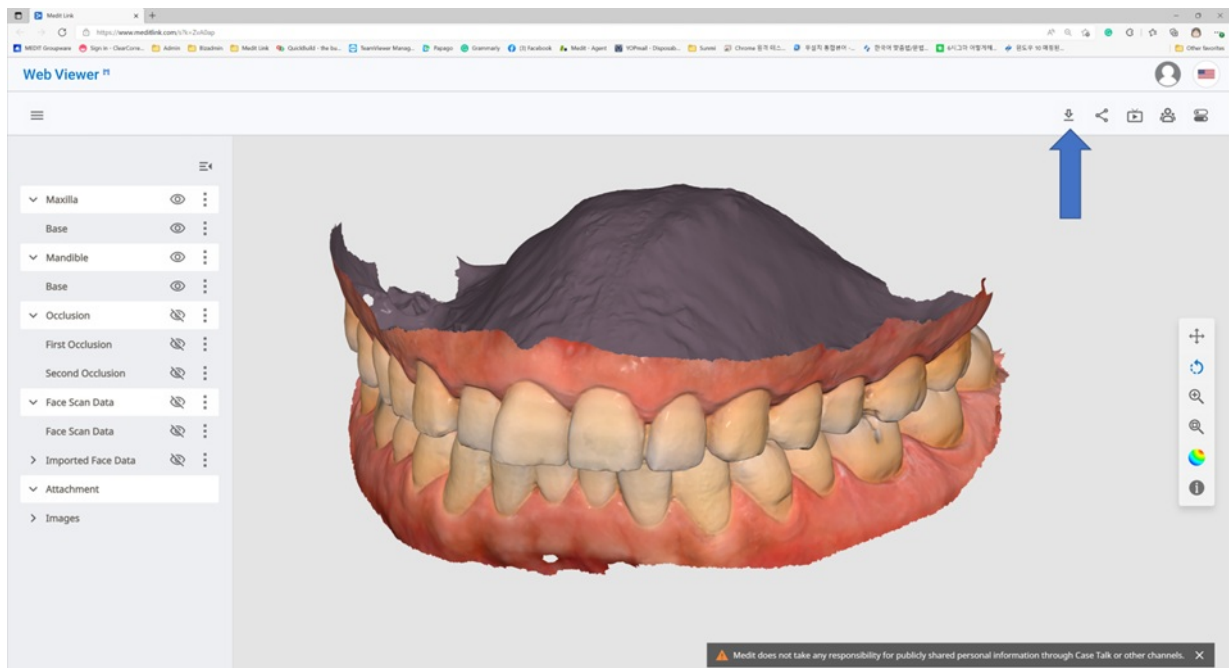

## 파일 다운로드 하기

1. "다운로드" 버튼을 클릭합니다.



2. 다운로드 창에서 파일 형식을 선택합니다.

Download **Premium Feature**

The premium feature is provided to all users for a limited time.  
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close

OK

3. "확인"을 클릭합니다.

## 주문 및 주문 관리

연결 프로그램으로 부터 얻은 데이터, 사용자가 첨부한 데이터를 파트너에게 주문할 수 있습니다.

### 주문

케이스를 거래처에 주문할 수 있습니다.

1. 화면 오른쪽 상단의 "주문"을 클릭합니다.
2. 주문에 필요한 정보를 확인합니다.

**Order**

General Order List File List

Partner  
WonhoonChoi\_Lab\_Stage

**WonhoonChoi\_Lab\_Stage**  
Seoul, KR  
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea  
01026088546

Case Name  
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name  
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date  
2023-04-13

Delivery Time  
오전 8:15

Memo

Tags  
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order  
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

3. 주문할 거래처를 선택합니다.
4. "주문 목록"에서 상품 정보와 전달할 파일을 확인합니다.
  - 환자 이름 공유 여부를 결정할 수 있습니다.
5. "파일 목록"에서 주문할 파일을 확인합니다.
6. 배송 희망 날짜를 입력합니다.
  - 초기값은 주문한 날 이후 **7일**로 설정됩니다.
7. 특이사항/주의사항 등의 메모/태그를 기입하여 거래처에 전달할 수 있습니다.
8. 스캔 앱에서 복수 교합 결과를 생성한 경우, "모든 교합 관계 주문하기"를 체크하여 전체 교합 결과를 보낼 수 있습니다.
9. 주문을 진행합니다.
  - **결제 건너뛰기:** **Medit Link**에서 제공하는 결제 시스템을 이용하지 않고 주문을 진행합니다. 계약 관계인 거래처에 주문할 경우 사용할 수 있습니다.
  - **결제:** **Medit Link**에서 제공하는 결제 시스템을 이용하여 결제를 이용하여 주문을 진행합니다. 계약 관계인 거래처에 주문할 경우 사용할 수 있습니다.
  - **확인:** 상품 가격에 대한 조건 없이 주문을 진행합니다. 파트너쉽 관계인 거래처에 주문할 경우 사용할 수 있습니다.


## 참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 결제 건너뛰기
- 결제


## 주문 수락 (In Box)

- 주문을 받은 거래처에서 주문 내용을 확인 후 주문을 수락합니다.
- 수락한 주문은 **Work Box**로 전달됩니다.

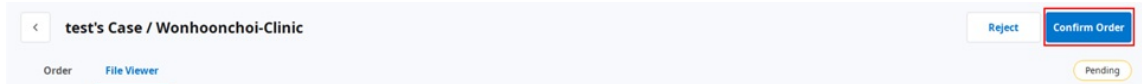


## 주문 취소 (Order Box)

- 거래처에서 주문을 수락하기 전, 주문을 취소할 수 있습니다.
- 취소한 주문은 다시 주문을 진행할 수 있습니다.

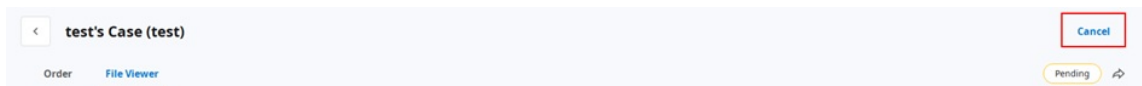


## 주문 거절 (In Box)

- 주문을 받은 거래처의 판단으로 주문을 거절할 수 있습니다.
- 취소한 주문은 다시 주문을 진행할 수 있습니다.

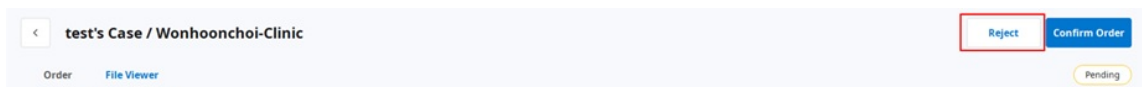

## 주문 케이스 확인

치과 계정의 **Order Box**에서 주문한 케이스의 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 기공소 계정이라면 **In Box**의 **Order Tab**에서 확인할 수 있습니다.

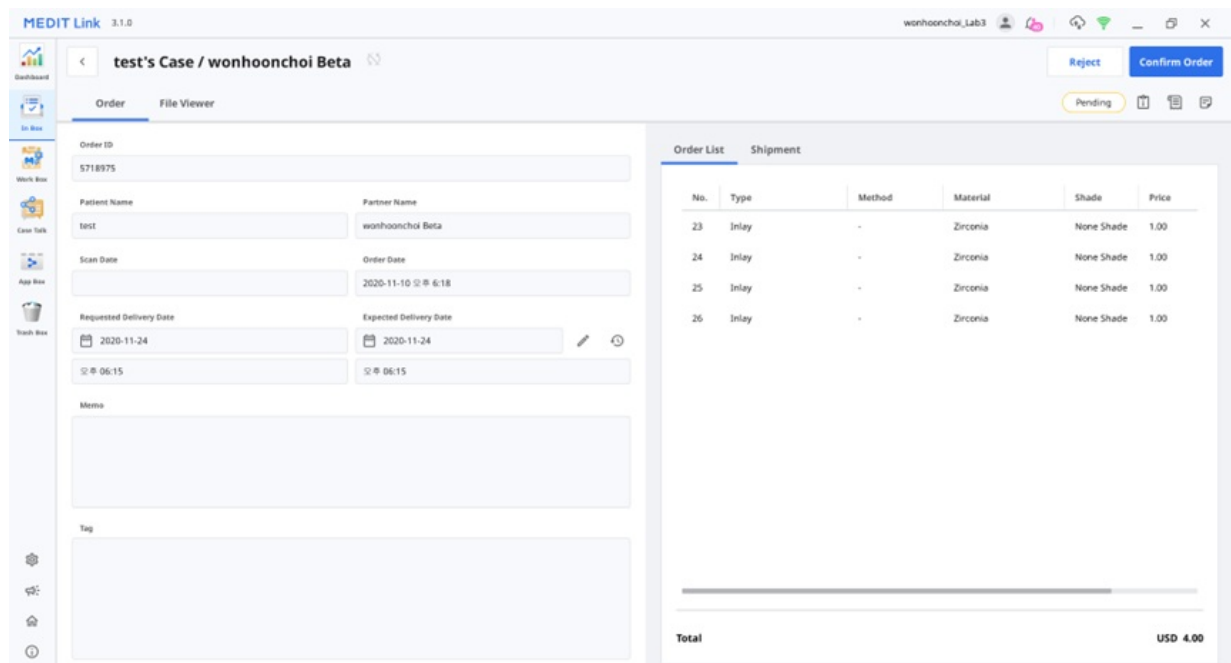

| No. | Type  | Method | Material | Shade      | Price |
|-----|-------|--------|----------|------------|-------|
| 23  | Inlay | -      | Zirconia | None Shade | 1.00  |
| 24  | Inlay | -      | Zirconia | None Shade | 1.00  |
| 25  | Inlay | -      | Zirconia | None Shade | 1.00  |
| 26  | Inlay | -      | Zirconia | None Shade | 1.00  |

Total USD 4.00

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주문<br>정보 | 주문 ID/환자 이름/거래처 이름/스캔한 날짜/주문한 날짜/배송 희망 날짜/배송 예정 날짜/<br>메모 등 주문한 제품의 상세 정보와 배송 정보를 확인합니다. |
| 주문<br>목록 | 주문 상품의 상세 정보를 표시합니다.                                                                     |
| 배송       | 배송 정보를 입력/확인합니다.                                                                         |

## 배송 정보 입력 및 배송 (In Box)

완료된 작업의 배송 정보를 입력하고 배송을 시작합니다.

1. “배송” 탭을 클릭합니다.
2. 배송 정보를 입력하고, “등록”을 클릭합니다.

**Shipment Registration**

Select a delivery method and enter the required information to register.  
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

---

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. 입력한 배송 정보는 거래처로 전달됩니다.

## 배송 예정 날짜/배송 희망 날짜 관리

주문시에 배송 희망 날짜를 입력할 수 있고, 이 정보는 거래처에 전달됩니다. 주문을 받은 계정에서는 실제 작업일을 고려하여 배송 예정 날짜를 입력할 수 있습니다. 입력한 배송 예정 날짜는 주문처에 전달되어 확인이 가능합니다.

### 배송 희망 날짜 입력 (치과 계정)

- **Case Box**에서 주문할 때 배송 희망 날짜를 입력할 수 있습니다.

**Order**

General Order List File List

Partner  
WonhoonChoi\_Lab\_Stage

**WonhoonChoi\_Lab\_Stage**  
Seoul, KR  
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea  
01026088546

Case Name  
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name  
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date  
2023-04-13

Delivery Time  
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags  
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- 초기값은 주문한 날짜로부터 7일 후입니다.
- 기공물의 배송을 희망하는 날짜/시간을 입력 후 주문을 진행합니다.
- 슬라이더를 이동해서 손쉽게 설정할 수 있습니다.

#### 배송 예정 날짜 입력 (기공소 계정)

- In Box에서 주문 받은 케이스의 배송 예정 날짜를 입력할 수 있습니다.

MEDIT Link 3.0.0 Wonhoon Choi

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID  
10413603

Patient Name  
test

Partner Name  
Wonhoonchoi-Clinic

Scanning Date  
2022-09-29 오전 7:56

Order Date  
2022-09-29 오전 8:13

Requested Delivery Date  
2022-10-01 오전 10:30

Expected Delivery Date  
2022-10-01 오전 10:30

Memo  
-Scanbody Library-  
16 : ODENTIS\_Custom\_(NMR) ver 1.41 - Custom\_Mini\_Extra Long\_16mm - N-HEX\_T10  
15 : ODENTIS\_Custom\_(NMR) ver 1.41 - Custom\_Mini\_Extra Long\_16mm - N-HEX\_T10  
14 : ODENTIS\_Custom\_(NMR) ver 1.41 - Custom\_Mini\_Extra Long\_16mm - N-HEX\_T10

Order List Shipment

| No. | Type          | Method            | Material               | Shade      | Price |
|-----|---------------|-------------------|------------------------|------------|-------|
| 16  | Implant Crown | Cementation Ty... | Multi-Layered Zirconia | None Sh... | 0     |
| 15  | Implant Crown | Cementation Ty... | Multi-Layered Zirconia | None Sh... | 0     |
| 14  | Implant Crown | Cementation Ty... | Multi-Layered Zirconia | None Sh... | 0     |

Total KRW 0

1. 치과에서 전달받은 배송 희망 날짜를 확인 후 조정이 필요한 경우 "편집" 버튼을 클릭합니다.



2. 실제 작업일을 고려하여 배송 예정 날짜를 입력합니다. 필요한 경우 코멘트도 남길 수 있습니다.
3. "적용"을 클릭합니다.

4. 입력한 배송 예정 날짜 및 코멘트가 주문과 함께 전달됩니다.
  - 주문한 계정의 **Order Box**에서 변경된 날짜 및 코멘트를 확인할 수 있습니다.
  - 입력한 배송 예정 날짜는 변경할 수 있고, 변경한 내용은 주문한 계정에 전달됩니다.
5. 변경 이력은 "이력" 버튼을 이용해 확인할 수 있습니다.



## 주문 완료

### 주문 과정 완료 (Work Box/In Box)


전달받은 작업이 모두 완료되면, "완료"를 이용해 작업을 완료합니다.

케이스 상세정보에서 완료하기

케이스 우측 상단의 더 보기 아이콘을 클릭합니다.



확장 메뉴에서 "완료"를 선택하여 케이스를 완료합니다.

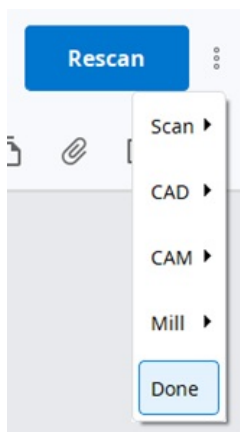


케이스 리스트에서 여러 개의 주문 완료하기

Work Box의 케이스 리스트에서 여러 개의 케이스를 선택하면 확장 메뉴가 제공됩니다.



다음과 같이 여러 개의 케이스를 완료하세요.

1. Work Box로 이동합니다.
2. 완료할 케이스를 모두 선택합니다.

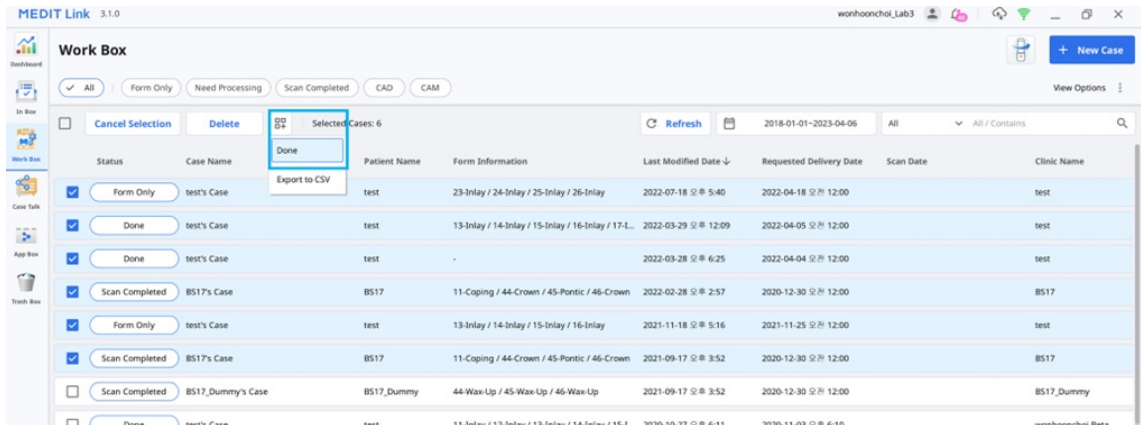

3. "확장 메뉴" 버튼을 클릭합니다.




4. 메뉴에서 "Done"을 선택합니다.

## 주문 과정 완료 (Case Box/Order Box)

기공소에서 작업이 완료되면, 치과에서 케이스를 확인 후 전체 주문 과정을 완료합니다.

기공소에서 작업이 완료된 케이스는 치과 계정의 Order Box의 해당 케이스에서 “수령 확인” 이 가능합니다.


"수령 확인"을 클릭하면 전체 주문 과정이 완료되고, 케이스는 "Case Completed"상태로 변경됩니다.

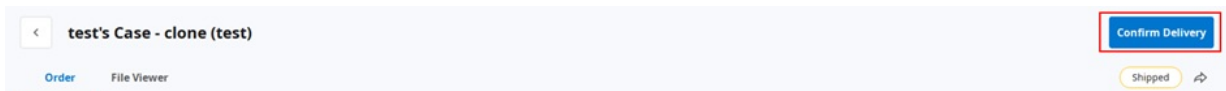

## 주문하지 않은 케이스를 “Case Completed” 상태로 변경하기

기공소로 주문하지 않고 진행한 케이스의 경우 다음 과정을 통해 “Case Completed” 상태로 변경할 수 있습니다.

1. Case Box로 이동합니다.
2. 완료하기 위한 케이스를 선택합니다.

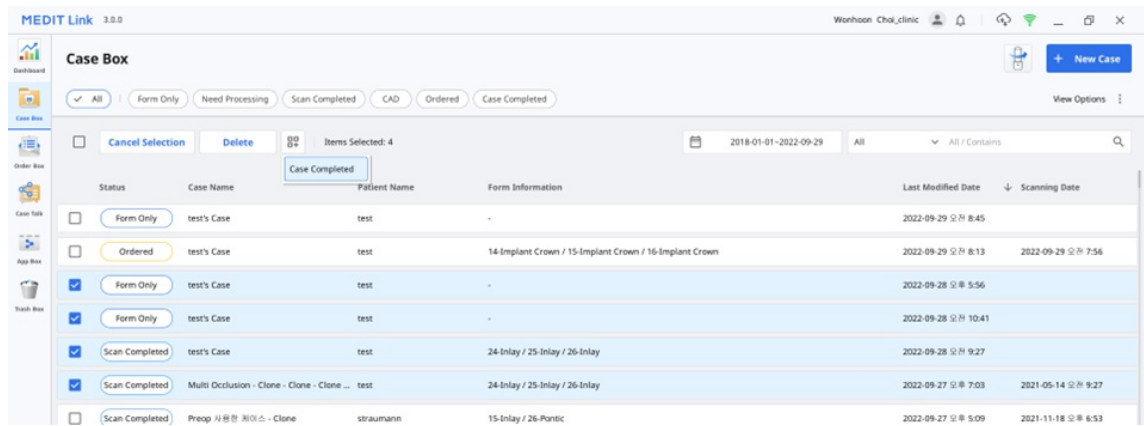

3. "확장 메뉴"를 클릭합니다.



4. "Case Complete"를 선택합니다.

## 태그를 이용한 커뮤니케이션

태그를 이용하여 케이스에 정보를 참고 정보를 기록하고 파트너에게 전달할 수 있습니다.

### 케이스 생성/수정 시 태그 입력

신규 케이스를 생성하거나, 케이스를 수정할 때 태그를 입력할 수 있습니다.

**New Case Information**

Patient Name\*

Case Name\*

**i** Creating patient information involves consent from the patient.  
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname ×

Specialmaterial ×

SpecialComment ×

**i** You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

한번 사용하였던 태그를 간편하게 검색하고 선택할 수 있습니다.

**New Case Information**

Patient Name\*

Case Name\*

**i** Creating patient information involves consent from the patient.  
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t (new)

**Suggestions**

tet

tagtest

tag

tat2

## 주문 시 태그 입력

주문할 때 태그를 확인 및 수정하고 파트너에게 전달할 수 있습니다.

**Order**

General   Order List   File List

Partner  
WonhoonChoi\_Lab\_Stage

**WonhoonChoi\_Lab\_Stage**  
Seoul, KR  
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea  
01026088546

Case Name  
mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name  
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date  
2023-04-13

Delivery Time  
오전 8:15   AM 8:00   PM 8:00

Memo

Tags  
Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel   OK

## 케이스 상세 화면에서 태그 확인

